

Civière de transport bariatrique MX-PRO

Manuel d'entretien

REF 6083



Table des matières

Définition de « Avertissement », « Mise en garde » et « Remarque »	2
Introduction à l'entretien	3
Durée de vie utile prévue	3
Coordonnées	3
Emplacement du numéro de série	3
Maintenance préventive	4
Lubrification de la base	4
Fiche d'entretien	5
Documentation sur la formation	6
Entretien	8
Réglage de la force de verrouillage des roues	8
Ensemble de civière	9
Ensemble de plan de couchage	13
Ensemble de base	18
Ensemble de roue moulée de 6 po	22
Ensemble de barre de verrouillage	23
Ensemble tube de levage externe, pivot de la base	24
Ensemble tube de levage interne, pivot de la base	25
Sans option de blocage des roues - 6082-500-010	26
Option de blocage d'une roue - 6082-501-010	27
Option de blocage de deux roues - 6082-502-010	28
Option de blocage de deux roues diagonale - 6082-503-010	29
Ensemble de blocage de roulette réglable	30
Ensemble de corne de roulette	31
Ensemble de barrière latérale	32
Ensemble de tube de levage	33
Ensemble de poignée de déblocage, gauche	36
Ensemble de tête détachable	37
Ensemble de montant à ramure	42
Ensemble de fixation modèle 6083	43
Ensemble de support de perfusion HAVASU, double, en trois parties	44
Ensemble de support de perfusion, en trois parties, côté gauche du patient	45
Ensemble de support de perfusion, en trois parties, côté droit du patient	46
Ensemble de support de perfusion, en trois parties	47
Porte-bouteille d'oxygène amovible en option - 6080-140-000	48
Porte-bouteille d'oxygène en option, côté pieds - 6070-140-000	49
Sans porte-bouteille d'oxygène en option, côté pieds - 6082-141-000	50
Ensemble de plateau support de bouteille d'oxygène, côté pieds	51
Ensemble de remorquage - 6083-039-000	52
Ensemble plan de couchage/adaptateur de base, gauche	53
Ensemble plan de couchage/adaptateur de base, droit	54
Ensemble plan de couchage/adaptateur de base, gauche	55
Ensemble plan de couchage/adaptateur de base, droit	56
Poignée de poussée/traction en option - 6083-040-000	57
Ensemble barre de poussée/traction	58
Crochet de sécurité avec capacité de levage en option - 6083-042-000	59
Poignée de levage latérale en option - 6083-041-000	60
Ensemble de protection du cadre en X en option - 6080-145-000	61
Matelas, transport bariatrique en option - 6083-028-000	62
Poche de rangement côté tête - 6083-001-202	63
Plateau de rangement en option, base - 6083-027-000	64
Sangle de sécurité patient en option - 6083-001-201	65
Extension de ceinture en option - 6082-160-050	66

Définition de « Avertissement », « Mise en garde » et « Remarque »

Les termes **AVERTISSEMENT**, **MISE EN GARDE** et **REMARQUE** ont une signification particulière et doivent faire l'objet d'une lecture attentive.

AVERTISSEMENT

Avertit le lecteur d'une situation qui, si elle n'est pas évitée, pourrait entraîner la mort ou des blessures graves. Peut également attirer l'attention sur l'existence potentielle d'effets indésirables graves ou de risques d'accident.

MISE EN GARDE

Avertit le lecteur d'une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, peut causer des blessures mineures ou modérées à l'utilisateur ou au patient ou endommager le matériel en question ou d'autres biens. Couvre notamment les précautions à prendre afin d'assurer l'utilisation sûre et efficace du dispositif et d'éviter les dommages qui pourraient découler de l'usage ou du mésusage du matériel.

Remarque - Fournit des informations spécifiques destinées à faciliter l'entretien ou à clarifier des instructions importantes.

Introduction à l'entretien

Ce manuel vous aide à entretenir le produit Stryker concerné. Lire ce manuel pour entretenir ce produit. Ce manuel ne traite pas du fonctionnement de ce produit. Consulter le manuel d'utilisation pour les instructions d'utilisation. Pour consulter le manuel d'utilisation ou le manuel d'entretien en ligne, aller sur le site <https://techweb.stryker.com/>.

Durée de vie utile prévue

La civière de transport bariatrique **MX-PRO** a une durée de vie utile prévue de 5 ans dans des conditions d'utilisation normales et en respectant la maintenance périodique appropriée.

Coordonnées

Contactez le service clientèle ou le support technique de Stryker au moyen des coordonnées suivantes : +1-800-327-0770.

Stryker Medical
3800 E. Centre Avenue
Portage, MI 49002
États-Unis

Remarque - L'utilisateur et/ou le patient doivent signaler tout incident grave lié au produit à la fois au fabricant et à l'autorité compétente de l'État membre européen où l'utilisateur et/ou le patient sont établis.

Pour consulter votre mode d'emploi ou votre manuel d'entretien en ligne, consultez <https://techweb.stryker.com/>.

Avoir le numéro de série (A) du produit Stryker à disposition avant d'appeler le service clientèle ou le support technique de Stryker. Inclure le numéro de série dans toutes les communications écrites.

Emplacement du numéro de série

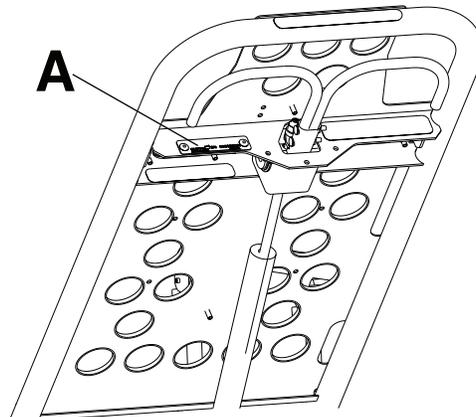


Figure 1 – Emplacement du numéro de série

Maintenance préventive

Fonctionnement	Calendrier	Procédure
Nettoyage et désinfection	Chaque utilisation	Voir la rubrique <i>Nettoyage</i> dans le manuel d'utilisation.
Inspection	Après le transport d'un patient corpulent Pour 1-25 appels par mois, inspecter la civière tous les 6 mois Pour 26-200 appels par mois, inspecter la civière tous les 3 mois Pour plus de 200 appels par mois, inspecter la civière tous les mois	Voir la liste de contrôle ci-dessous.

Remarque - Tenir à jour les registres d'entretien à l'aide du formulaire de registre d'entretien de votre manuel d'entretien.

- _____ Toutes les attaches sont solidement fixées (consulter tous les schémas de montage)
- _____ Toutes les soudures sont intactes, absence de fissures ou de cassures
- _____ Les tubulures et les feuilles de métal ne sont ni pliées ni cassées
- _____ Absence de débris dans les roues
- _____ Toutes les roues sont fixées, roulent et pivotent
- _____ Le blocage de roue en option maintient solidement la roue quand il est activé et la libère quand il est désactivé
- _____ Mouvement et verrouillage corrects des barrières
- _____ Fonctionnement correct du relève-buste
- _____ Les accessoires et les pièces fonctionnent
- _____ Le loquet de positionnement en hauteur fonctionne
- _____ La civière est fixée à chaque position en hauteur
- _____ Le cadre de la base se plie
- _____ La section tête détachable fonctionne
- _____ La barre de sécurité fonctionne
- _____ Le repose-pieds fonctionne
- _____ La housse de matelas ne présente aucune déchirure ou fissure
- _____ Les sangles de retenue du corps sont intactes et fonctionnent
- _____ Lubrifier les tubes de la base (en option)
- _____ Les crochets à clapet du côté pieds ne sont pas usés

Numéro de série :
Effectué par :
Date :

Lubrification de la base

Remarque - Le produit est conçu pour fonctionner sans devoir être lubrifié. **Tri-Flow™** avec lubrifiant **Teflon®** peut être utilisé pour réduire la force nécessaire pour élever le châssis porteur et pour minimiser l'usure. Ne pas utiliser de silicone, **WD-40™** ou de graisse au lithium pour éviter d'endommager les pièces mobiles de la civière.

1. Placer la civière à la position la plus haute.
2. Retourner la civière avec les pieds de base orientés vers le haut.
3. À l'aide du tube applicateur en plastique, pulvériser du **Tri-Flow™** avec lubrifiant **Teflon®** (6082-199-012) dans l'espace entre les tubes de levage supérieur (A) et inférieur (B) sur les deux pieds du côté pieds (Figure 2).

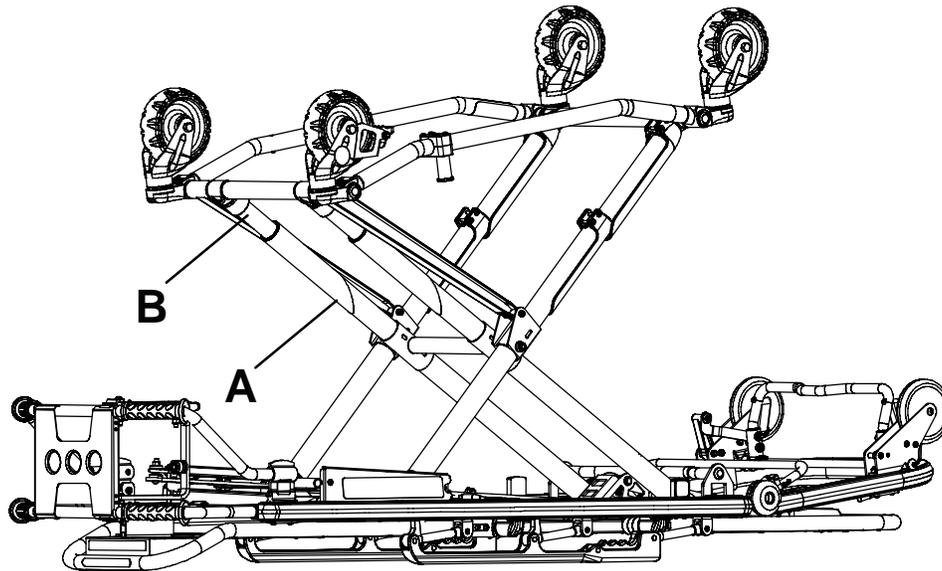


Figure 2 – Emplacements de lubrification de la base

4. Appliquer du **Tri-Flow™** aux supports d'ajustement de la hauteur droit et gauche (C) (Figure 3). Appliquer uniformément.
5. Appliquer du **Tri-Flow™** sur les plaques coulissantes droite et gauche (D) (Figure 3). Appliquer uniformément.

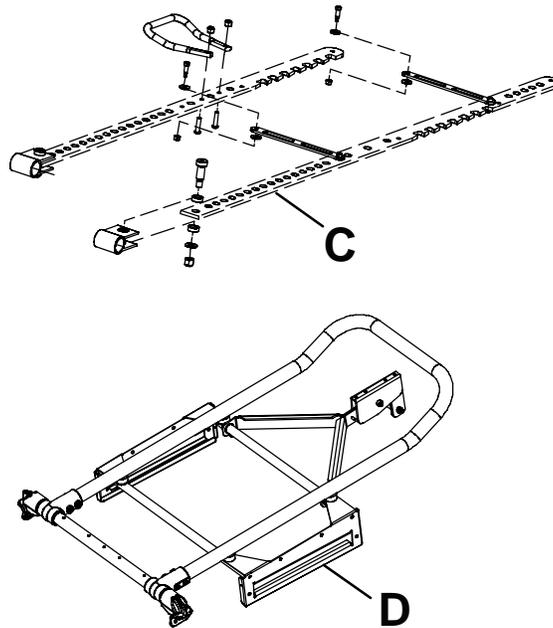


Figure 3 – Supports d'ajustement de la hauteur et plaques coulissantes

6. Laisser la civière reposer pendant cinq minutes.
7. Retourner la civière. Élever et abaisser la civière plusieurs fois pour faire pénétrer le lubrifiant dans les zones d'application.
8. Essuyer l'excès de lubrifiant des tubes de base.
9. S'assurer du fonctionnement correct de la civière avant de la remettre en service.

Fiche d'entretien

Date	Opération d'entretien exécutée	Par	Heures

Entretien

Réglage de la force de verrouillage des roues

Outils requis :

- Clé hexagonale de 5/32 po
- Clé mixte ou douille de 7/16 po

Procédure :

1. À l'aide d'une clé hexagonale de 5/32 po et d'une clé mixte de 7/16 po ou d'une douille, retirer la vis à tube du centre de la pédale de verrouillage. Conserver la vis. Le blocage de roue est initialement assemblé avec la pédale réglée sur la force de verrouillage minimale. Le repère sur la pédale (A) est aligné avec le repère sur la gaine octogonale (B) (Figure 4).
2. Retirer la gaine octogonale (B). Tourner la gaine octogonale dans le sens antihoraire pour augmenter la force de verrouillage de la pédale et dans le sens horaire pour la diminuer. Insérer la gaine octogonale dans la pédale.
3. À l'aide d'une clé hexagonale de 5/32 po et d'une clé mixte ou d'une douille de 7/16 po, réinstaller la vis à douille (retirée à l'étape 1).
4. Tester la force de verrouillage de la pédale et s'assurer que la pédale est maintenue avant de remettre le produit en service.




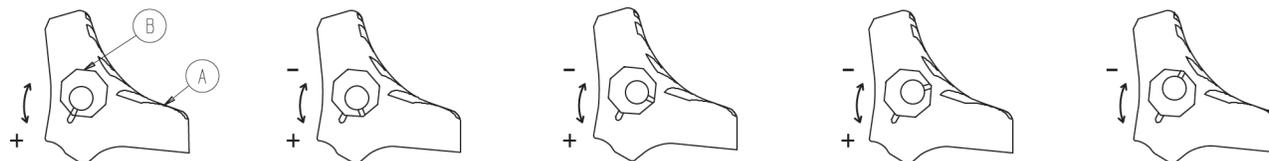


Figure 4 – Réglage de la force de verrouillage des roues


Ensemble de civière

6083-001-012 Rév. AB (référence uniquement)





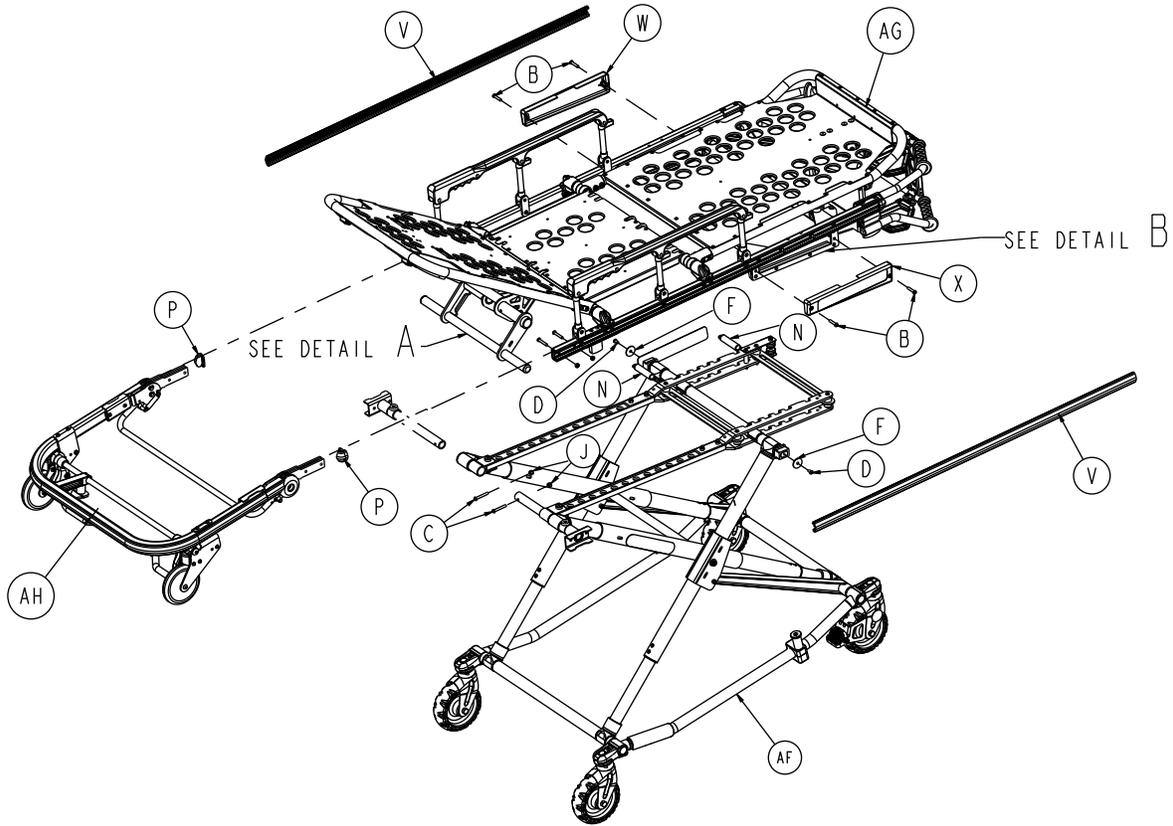
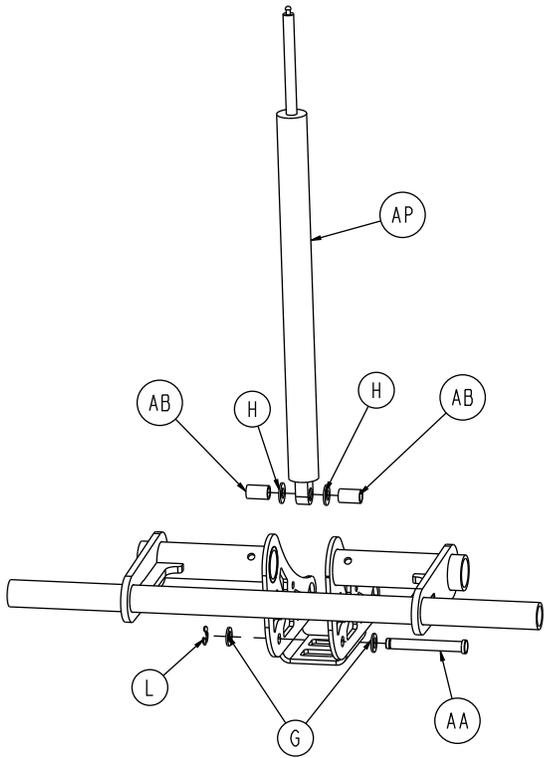


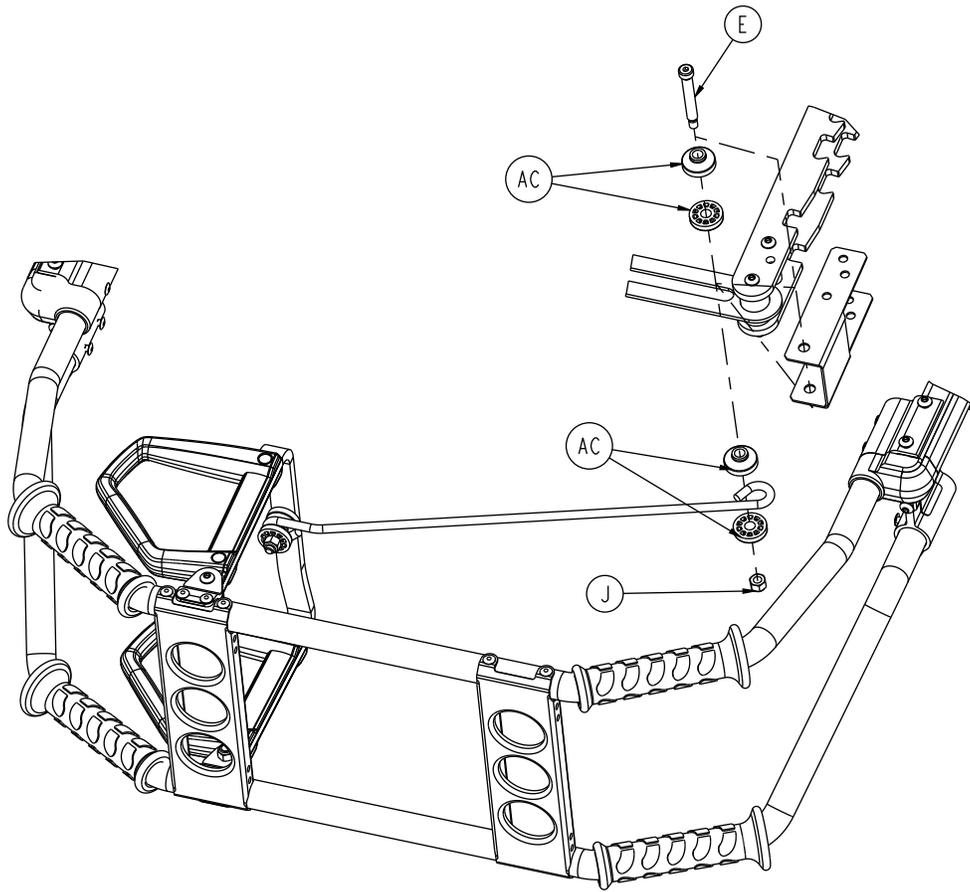


DETAIL A

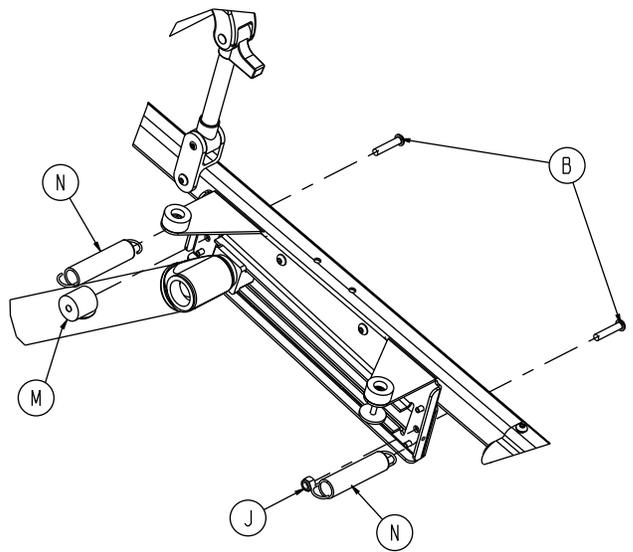

DETAIL B

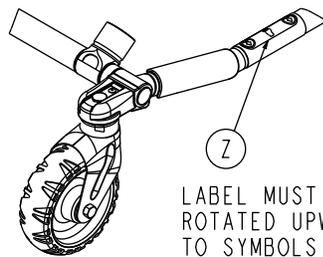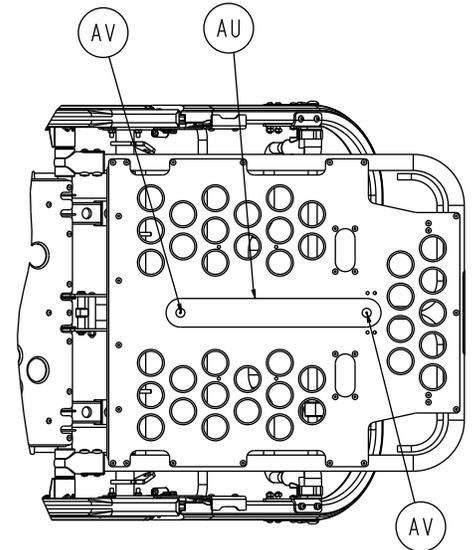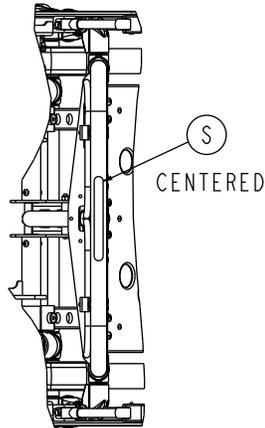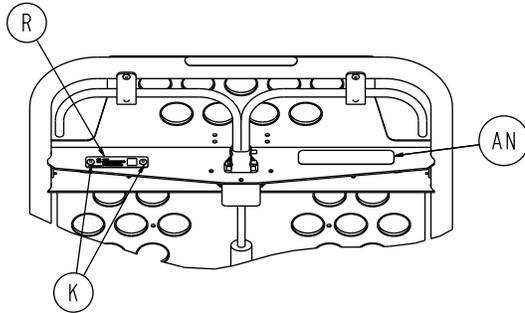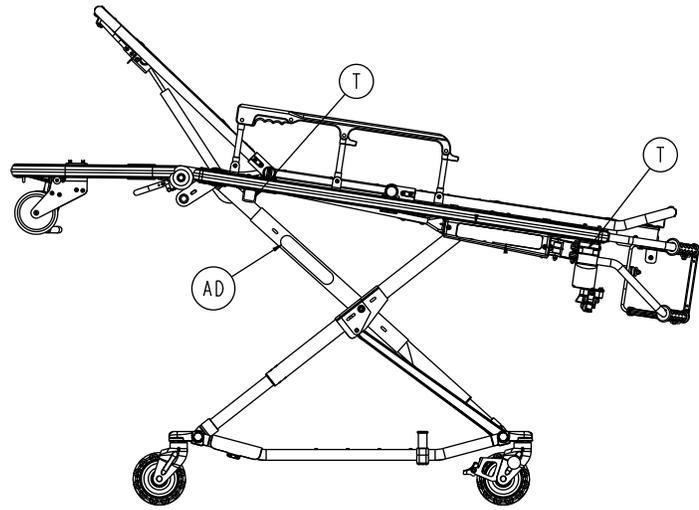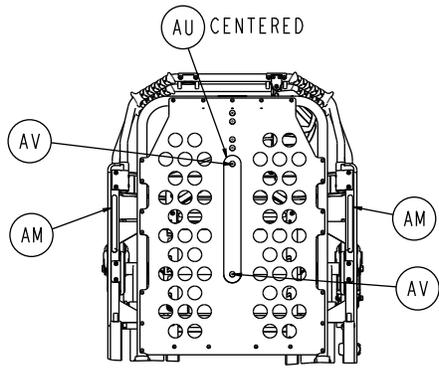

LABEL MUST BE ASSEMBLED AS SHOWN
 ROTATED UPWARDS TO PREVENT DAMAGE
 TO SYMBOLS DUE TO SIDE SCRAPING

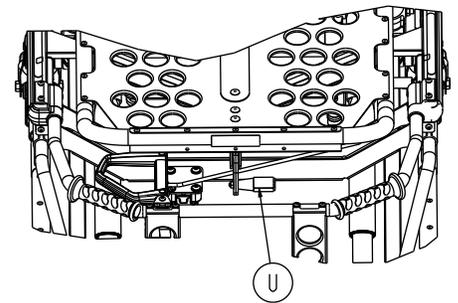


Élément	Numéro	Nom	Quantité
B	0004-198-000	Vis d'assemblage à tête ronde	4
C	0004-204-000	Vis d'assemblage à tête ronde	2
D	0004-325-000	Vis d'assemblage à tête ronde	2
E	0008-028-000	Vis à épaulement à tête creuse	1
F	0011-355-000	Rondelle	2
G	0011-448-000	Rondelle	2


Élément	Numéro	Nom	Quantité
H	0014-021-000	Rondelle	2
J	0016-028-000	Écrou hexagonal	5
K	0025-079-000	Rivet à tête en dôme	2
L	0028-181-000	Circlip	1
M	0037-082-000	Support de vibration	2
N	0038-348-000	Ressort d'extension	2
P	6060-037-035	Capuchon d'extrémité du rail externe	2
R	6083-001-926	Étiquette, étiquette avec numéro de série	1
S	6060-090-004	Étiquette, petite, RUGGED	2
T	6060-090-114	Étiquette, tenir les mains à l'écart	4
U	6070-090-107	Étiquette, soulever pour libérer	1
V	6080-030-043	Pare-chocs du châssis du plan de couchage	2
W	6082-033-036	Couvercle de plaque de retenue, gauche	1
X	6082-033-037	Couvercle de plaque de retenue, droit	1
Z	6080-090-108	Étiquette, soulever ici	2
AA	6082-031-031	Axe à épaulement	1
AB	6082-031-046	Entretoise pivotante de l'interface plan de couchage/base	2
AC	6082-040-025	Bague de connexion terminale	4
AD	6082-090-042	Étiquette, 8" Stryker	2
AF	6083-001-010	<i>Ensemble de base (page 18)</i>	1
AG	6083-001-011	<i>Ensemble de plan de couchage (page 13)</i>	1
AH	6083-001-028	<i>Ensemble de tête détachable (page 37)</i>	1
AM	6083-001-163	Étiquette, poids	2
AN	6083-001-130	Étiquette, spécification, transport bariatrique	1
AP	6083-001-135	Amortisseur à gaz	1
AU	6082-001-085	Adhésif côté velours de 2 po	2
AV	0025-132-000	Grand rivet de bride	4

Ensemble de plan de couchage


6083-001-011 Rév. AB (référence uniquement)

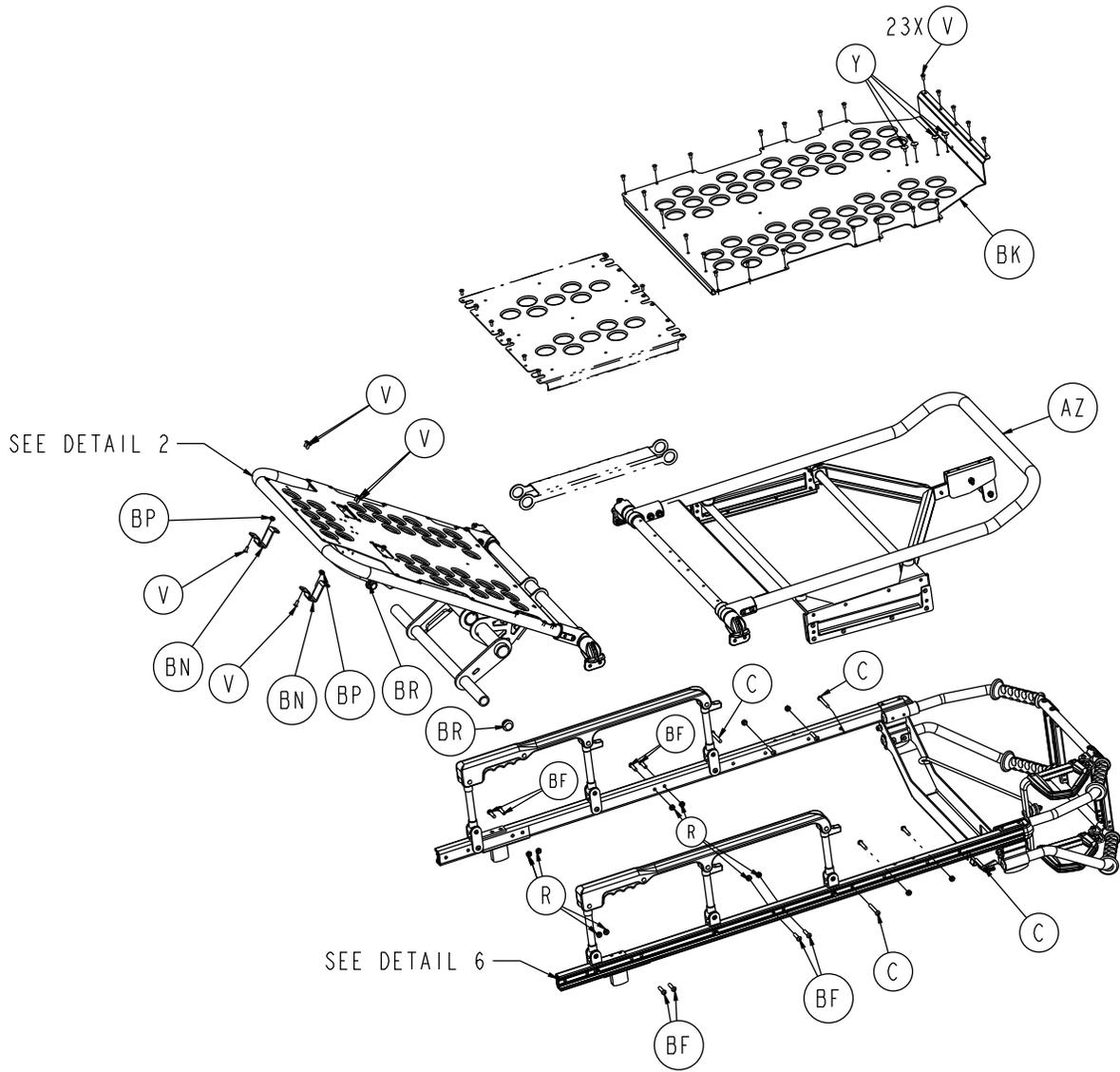


DETAIL 1

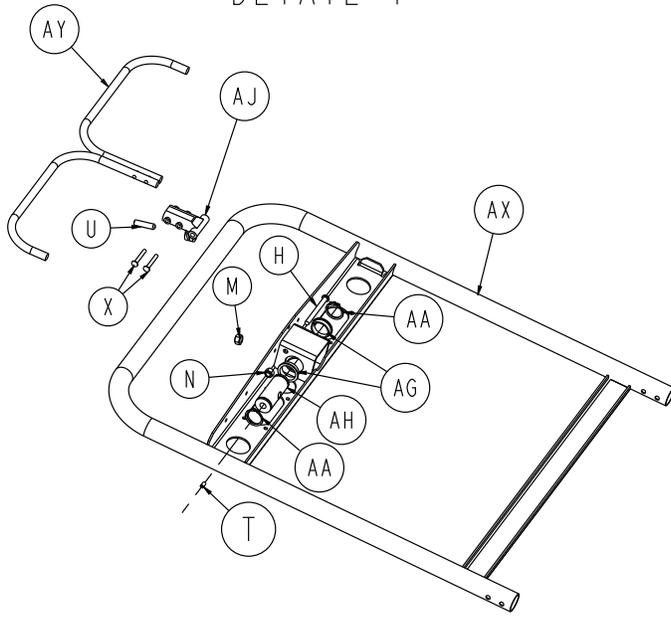


DETAIL 2

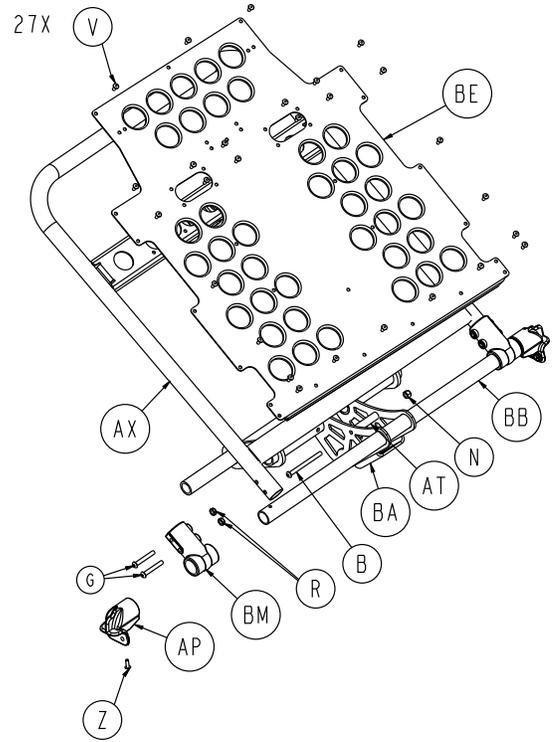


DETAIL 3

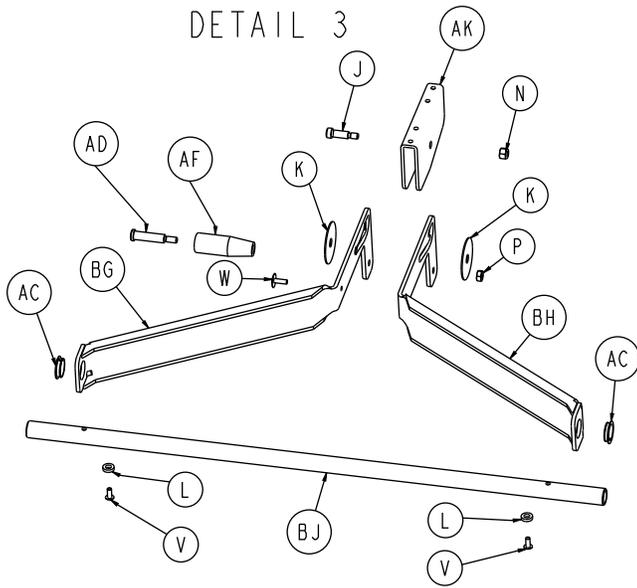

DETAIL 4

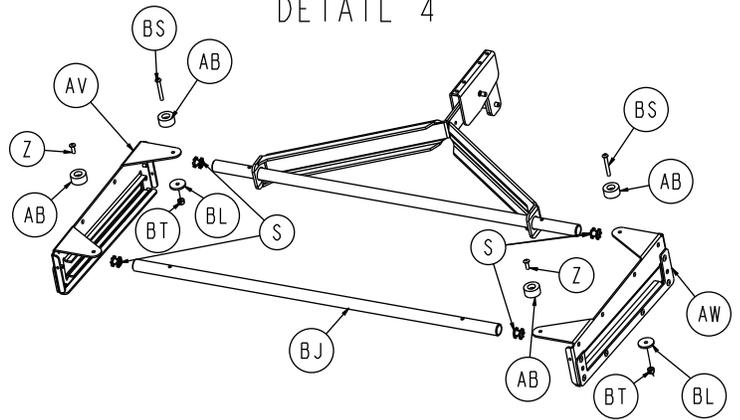

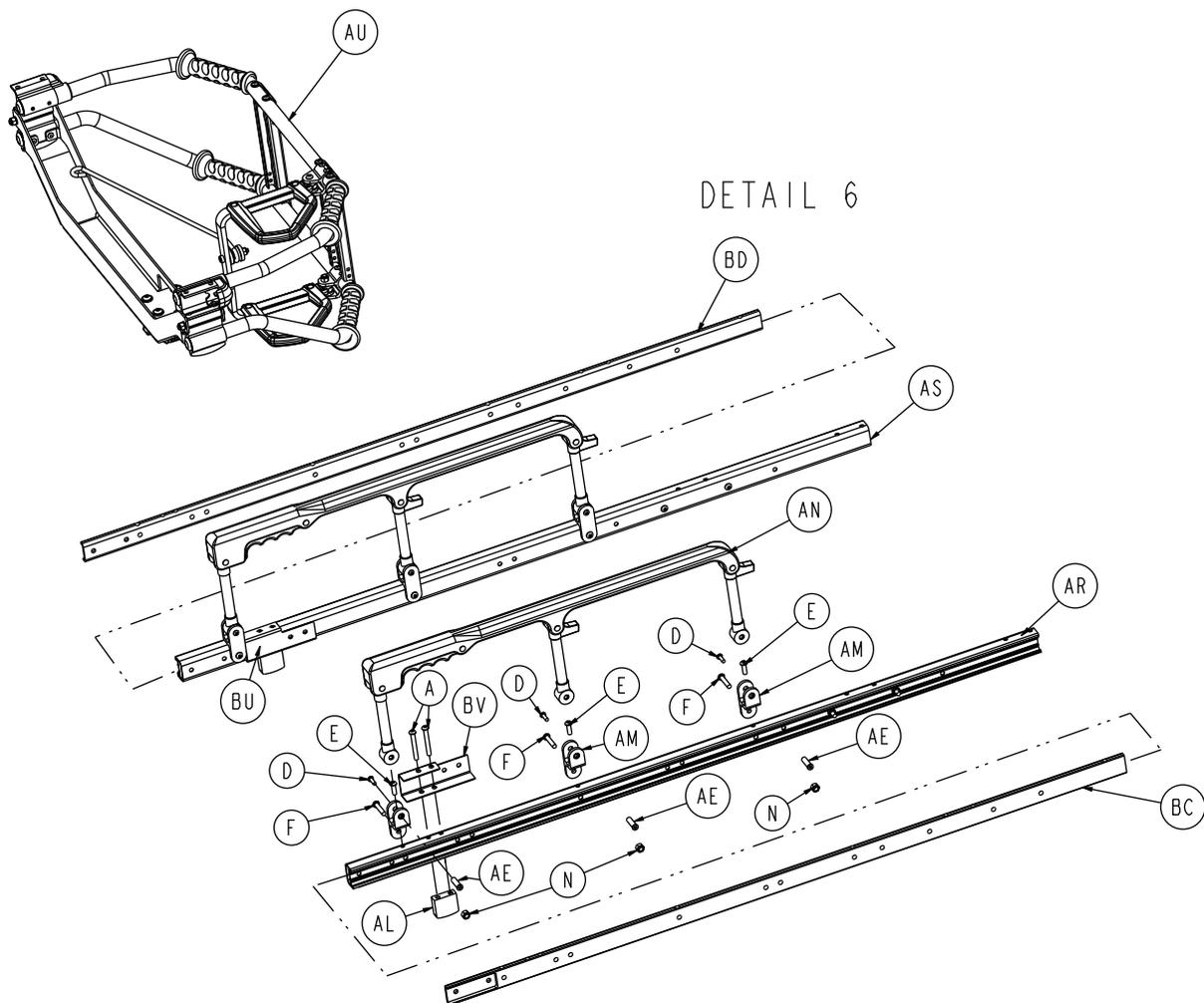


Élément	Numéro	Nom	Quantité
A	0004-097-000	Vis d'assemblage à tête ronde	8
B	0004-098-000	Vis d'assemblage à tête ronde	1
C	0004-503-000	Vis d'assemblage à tête ronde	4
D	0004-203-000	Vis d'assemblage à tête ronde	6
E	0004-468-000	Vis d'assemblage à tête ronde	6
F	0004-198-000	Vis d'assemblage à tête ronde	6
G	0004-204-000	Vis d'assemblage à tête ronde	5
H	0004-597-000	Vis d'assemblage à tête ronde	1
J	0008-027-000	Vis à épaulement à tête creuse	1
K	0014-055-000	Rondelle	2
L	0014-067-000	Rondelle	2
M	0015-050-000	Écrou hexagonal	1
N	0016-028-000	Écrou Nylock	9
P	0016-078-000	Écrou de verrouillage central	1
R	0016-102-000	Écrou Nylock	12
S	0018-038-000	Écrou hexagonal	4
T	0021-180-000	Vis de blocage	1
U	0021-138-000	Vis de blocage	1
V	0025-079-000	Rivet	56


Élément	Numéro	Nom	Quantité
W	0025-128-000	Rivet aveugle	1
X	0025-131-000	Rivet semi-tubulaire	4
Y	0025-132-000	Rivet aveugle	2
Z	0025-133-000	Rivet	6
AA	0028-076-000	Bague de retenue	2
AB	0056-016-000	Pare-chocs	4
AC	0081-255-000	Roulement fendu	2
AD	6083-001-168	Boulon à épaulement à tête fendue	1
AE	0721-026-066	Vis de pivot	6
AF	0938-001-177	Molette	1
AG	0946-035-025	Insert	2
AH	6060-032-038	Étrier du ressort à gaz	1
AJ	6060-032-040	Pivot du relève-buste	1
AK	6070-038-033	Dispositif de retenue du support de mollet	1
AL	6080-030-040	Butée du plan de couchage	2
AM	6082-025-055	Montage de pivot	6
AN	6082-026-010	<i>Ensemble de barrière latérale (page 32)</i>	2
AP	6082-030-031	Fixation du support de traverse	2
AR	6082-030-046	Rail de support externe, droit	1
AS	6082-030-047	Rail de support externe, gauche	1
AT	6082-031-047	Entretoise pivotante, plan de couchage/base	1
AU	608302010020	<i>Ensemble de tube de levage (page 33)</i>	1
AV	6083-001-030	Plaque coulissante, gauche	1
AW	6083-001-031	Plaque coulissante, droite	1
AX	6083-001-054	Ensemble soudé du relève-buste	1
AY	6083-001-055	Libérer l'assemblage soudé de la poignée	1
AZ	6083-001-057	Ensemble soudé de la section pieds	1
BA	6083-001-061	Interface plan de couchage/base	1
BB	6083-001-110	Traverse du plan de couchage	1
BC	6083-001-111	Insert de rail, gauche	1
BD	6083-001-112	Insert de rail, droit	1
BE	6083-001-113	Revêtement du relève-buste	1
BF	0004-197-000	Vis d'assemblage à tête ronde	8
BG	6083-001-117	Support de mollet, gauche	1
BH	6083-001-118	Support de mollet, droit	1
BJ	6083-001-119	Traverse du plan de couchage	2
BK	6083-001-120	Peau de la section pieds	1
BL	6083-001-181	Entretoise	2
BM	6100-003-125	Pivot « t » droit	2
BN	6083-001-147	Support de poignée du relève-buste	2
BP	0037-052-000	Pare-chocs	2
BR	0037-225-000	Obturateur	2
BS	0004-215-000	Vis d'assemblage à tête ronde	2
BT	0016-003-000	Écrou Nylock	2

Élément	Numéro	Nom	Quantité
BU	6083-210-030	Support de barre, gauche	1
BV	6083-210-301	Support de barre, droit	1

Ensemble de base

6083-001-010 Rév. J (référence uniquement)

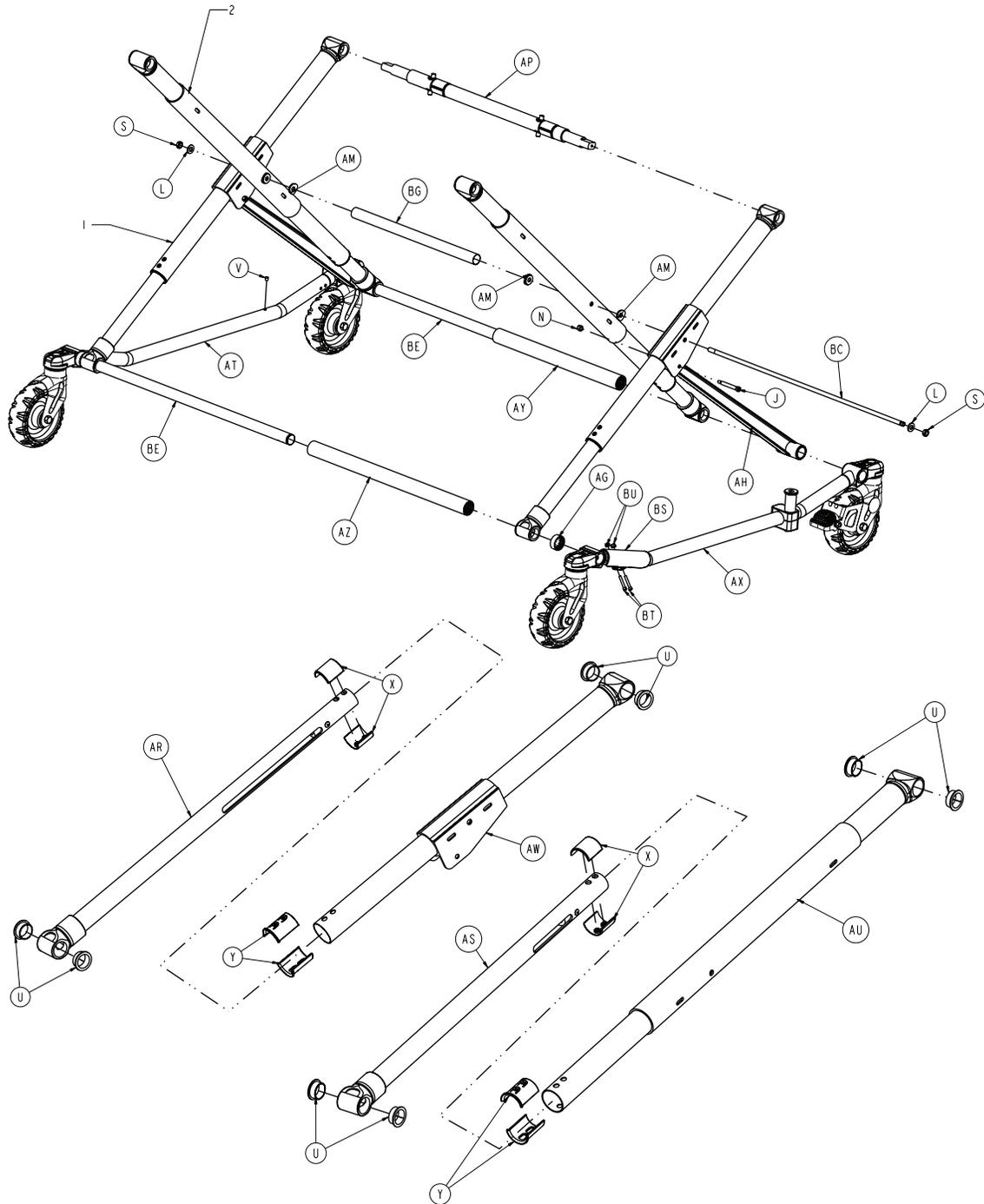

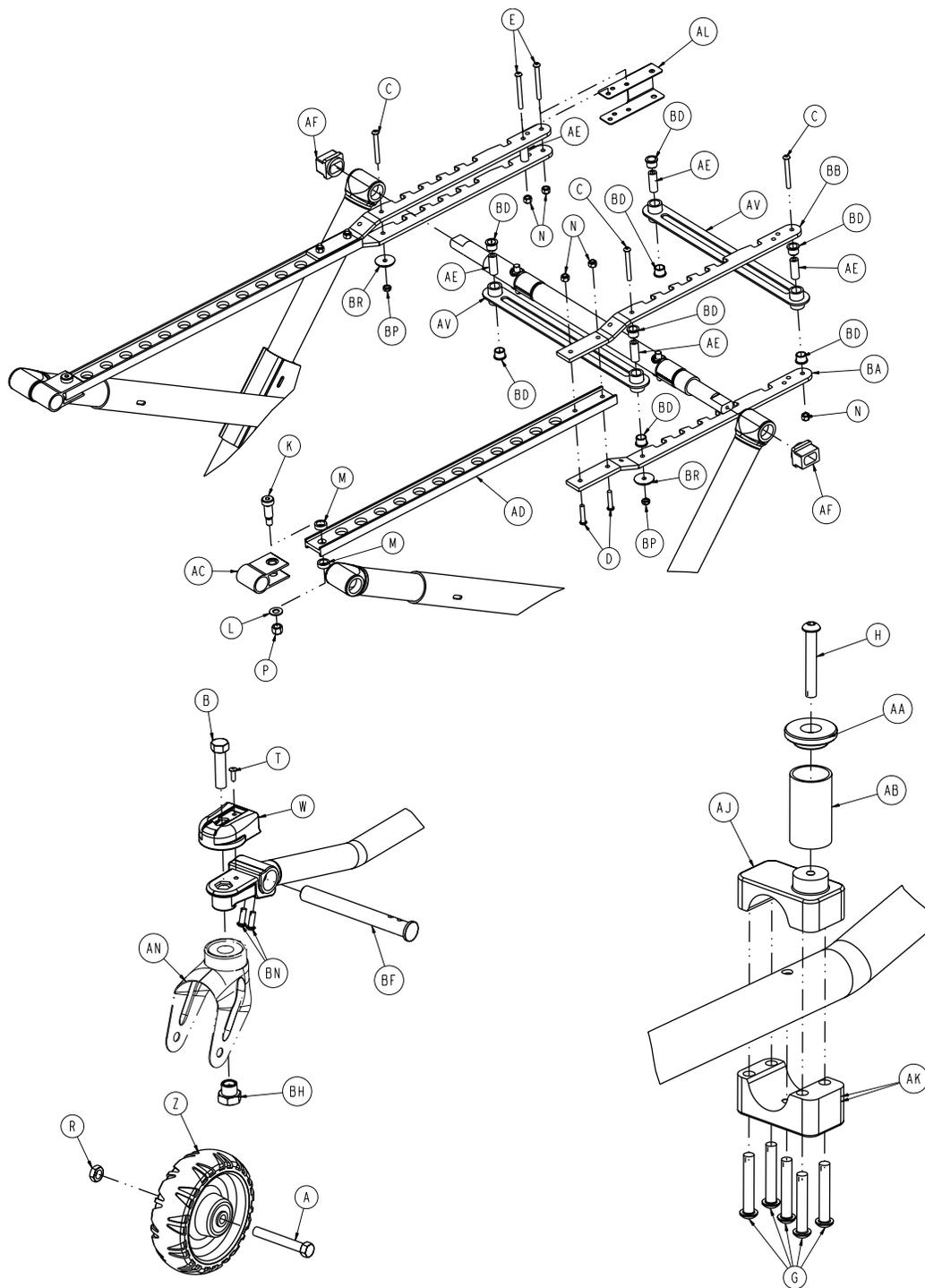


Élément	Numéro	Nom	Quantité
A	0003-205-000	Vis d'assemblage à tête hexagonale	4
B	0003-353-000	Vis d'assemblage à tête hexagonale	4
C	0004-163-000	Vis d'assemblage à tête ronde	3
D	0004-198-000	Vis d'assemblage à tête ronde	4
E	0004-234-000	Vis d'assemblage à tête ronde	2
G	0004-207-000	Vis d'assemblage à tête ronde	5
H	0004-503-000	Vis d'assemblage à tête ronde	1
J	0008-028-000	Vis à épaulement à tête creuse	2

Élément	Numéro	Nom	Quantité
K	0008-045-000	Vis à épaulement à tête creuse	2
L	0011-004-000	Rondelle	4
M	0011-350-000	Rondelle	4
N	0016-028-000	Écrou hexagonal	9
P	0016-035-000	Écrou Nylock hexagonal	2
R	0016-060-000	Contre-écrou hexagonal Toplock	4
S	0016-089-000	Contre-écrou hexagonal Centerlock	2
T	0025-133-000	Rivet à tête en dôme	4
U	0081-244-000	Roulement de bride	16
V	0721-031-065	Bouchon de trou	1
W	6060-001-021	Couvercle de montage de roulette	4
X	6060-001-070	Roulement du tube du cadre supérieur	8
Y	6060-001-071	Roulement du tube du cadre inférieur	8
Z	6060-002-010	<i>Ensemble de roue moulée de 6 po (page 22)</i>	4
AA	6060-004-043	Capuchon du montant de retenue	1
AB	6060-004-044	Tube du montant de retenue	1
AC	6060-005-029	Extrusion du pivot de montage	2
AD	6060-005-032	Barre de réglage en hauteur	2
AE	6060-005-037	Entretoise de liaison de l'entretoise	5
AF	6060-005-044	Coussinet coulissant de la barre de verrouillage	2
AG	6080-001-029	Entretoise d'extrusion en plastique	2
AH	6080-001-046	Tige de liaison	2
AJ	6080-004-045	Partie supérieure du support pour broche	1
AK	6083-001-166	Partie inférieure du support pour broche	1
AL	6080-040-088	Support de liaison	1
AM	6083-001-169	Roulement de bielle	4
AP	6083-001-025	<i>Ensemble de barre de verrouillage (page 23)</i>	1
AR	6083-001-026	<i>Ensemble tube de levage externe, pivot de la base 2 (page 24)</i>	2
AS	6083-001-027	<i>Ensemble tube de levage interne, pivot de la base 2 (page 25)</i>	2
AT	6083-001-050	Soudure du tube de la base externe, gauche	1
AU	6083-001-051	Soudure du tube de levage interne du pivot interne	2
AV	6083-001-058	Connexion de l'entretoise de support	2
AW	6083-001-062	Soudure du tube de levage externe du pivot du plan de couchage	2
AX	6083-001-063	Soudure du tube de la base externe, droite	1
AY	6083-001-101	Entretoise	1
AZ	6083-001-102	Entretoise	1
BA	6083-001-227	Support de réglage de la hauteur, inférieur	2
BB	6083-001-228	Support de réglage de la hauteur, supérieur	2
BC	6083-001-105	Tige de connexion de la base	1
BD	6083-001-108	Roulement à bride	8
BE	6083-001-109	Tube de base, tête/pied	2
BF	6083-001-137	Insert de tube de base	4
BG	6083-001-131	Entretoise de base centrale	1
BH	6090-001-009	Écrou de roulette	4

Élément	Numéro	Nom	Quantité
BN	0004-468-000	Vis d'assemblage à tête ronde	8
BP	0016-102-000	Écrou Nylock	2
BR	6083-001-180	Pare-chocs du support	2
BS	6082-001-044	Protection pour tube de châssis	1
BT	0004-160-000	Vis d'assemblage à six pans creux	2
BU	0016-003-000	Écrou Nylock hexagonal	2

Ensemble de roue moulée de 6 po


6060-002-010 rév. D (référence uniquement)

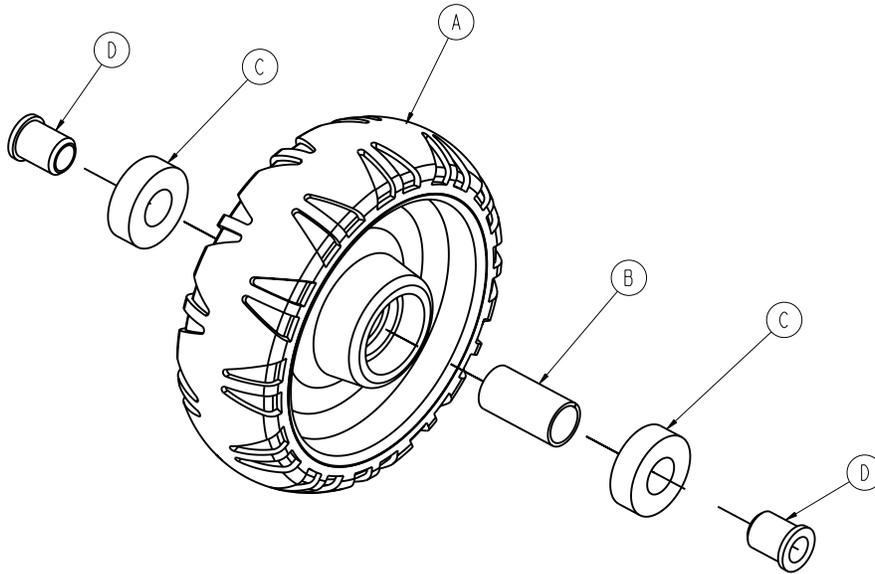

Élément	Numéro	Nom	Quantité
A	6060-002-045	Roue moulée de 6 po	1
B	6060-002-046	Entretoise de roulement	1
C	0081-226-000	Roulement	2
D	0715-001-255	Douille de roue	2

Ensemble de barre de verrouillage


6083-001-025 rév. A (référence uniquement)

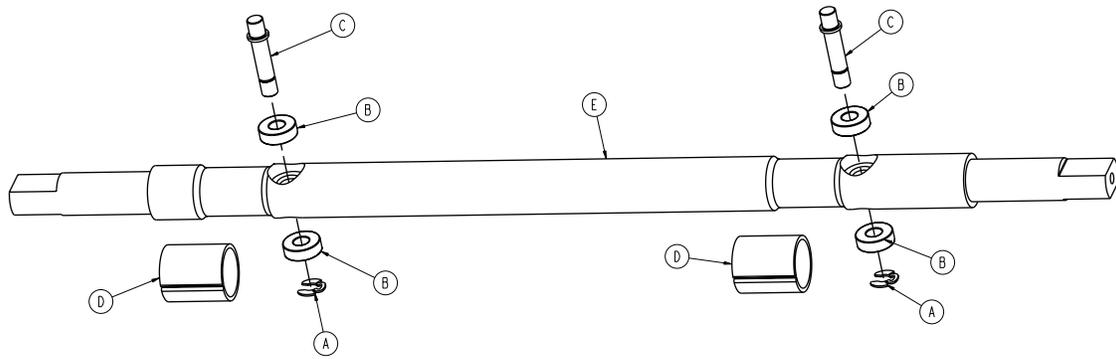

Élément	Numéro	Nom	Quantité
A	0028-181-000	Anneau Truarc	2
B	0081-248-000	Roulement	4
C	6060-005-096	Broche de verrouillage	2
D	6080-005-036	Anneau d'usure	2
E	6083-001-106	Barre de verrouillage	1

Ensemble tube de levage externe, pivot de la base


6083-001-026 rév. A (référence uniquement)

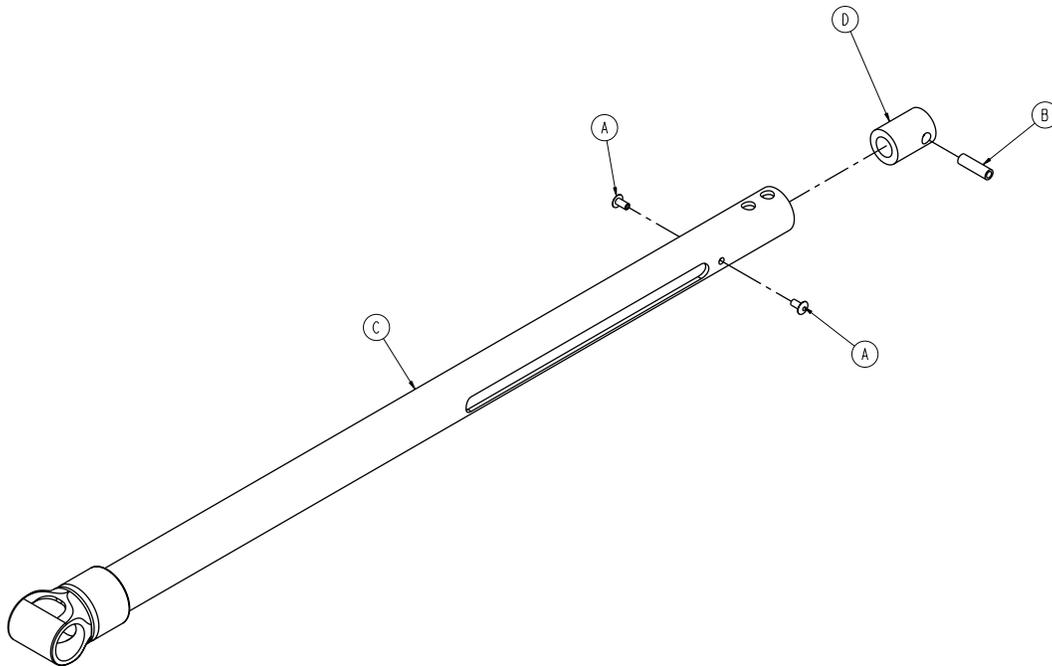

Élément	Numéro	Nom	Quantité
A	0025-079-000	Rivet de la tête du dôme	2
B	6082-001-036	Manchon amortisseur	1
C	6083-001-052	Soudure du tube de levage externe	1
D	6083-001-139	Amortisseur	1

Ensemble tube de levage interne, pivot de la base


6083-001-027 rév. A (référence uniquement)

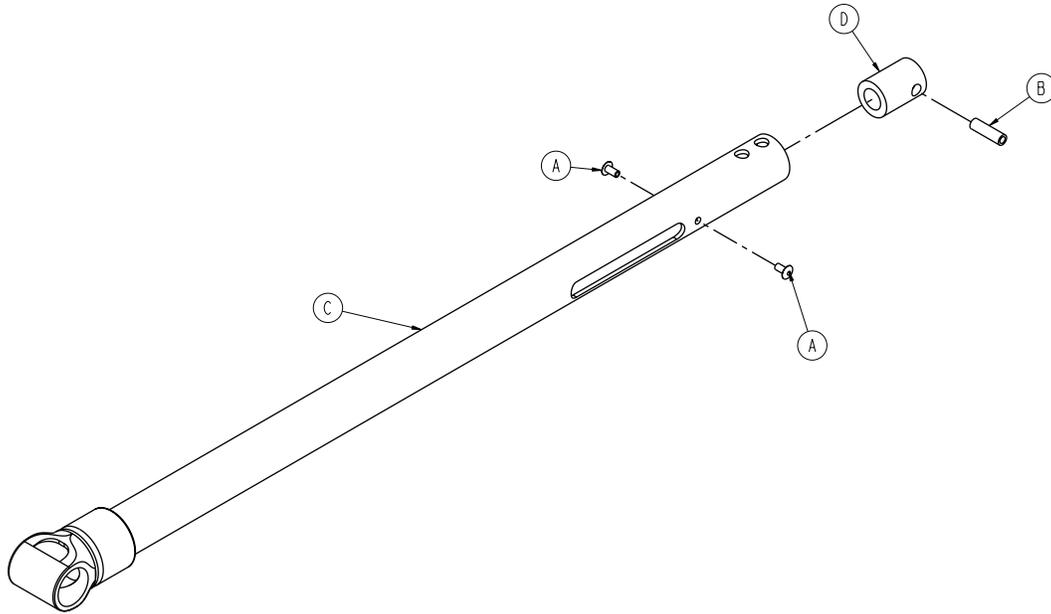

Élément	Numéro	Nom	Quantité
A	0025-079-000	Rivet de la tête du dôme	2
B	6082-001-036	Manchon amortisseur	1
C	6083-001-053	Soudure du tube de levage interne	1
D	6083-001-139	Amortisseur	1

Sans option de blocage des roues - 6082-500-010


Rév. B (référence uniquement)

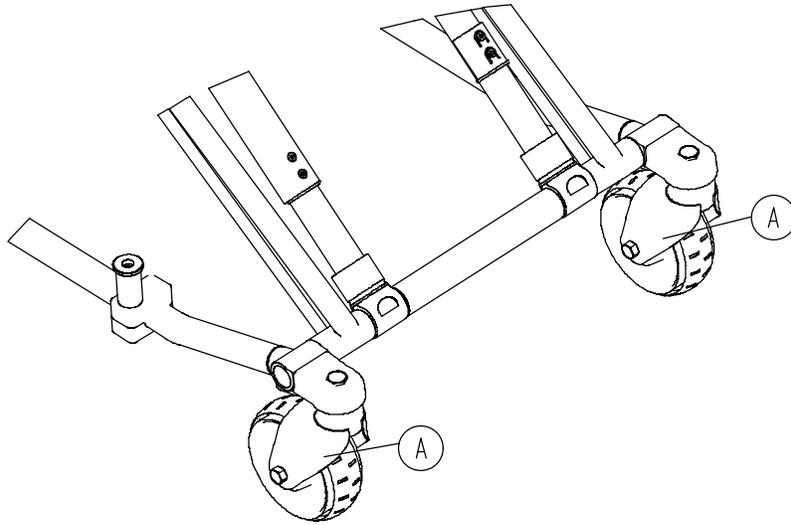

Élément	Numéro	Nom	Quantité
A	6082-002-012	Ensemble de corne de roulette (page 31)	4

Option de blocage d'une roue - 6082-501-010


Rév. B (référence uniquement)

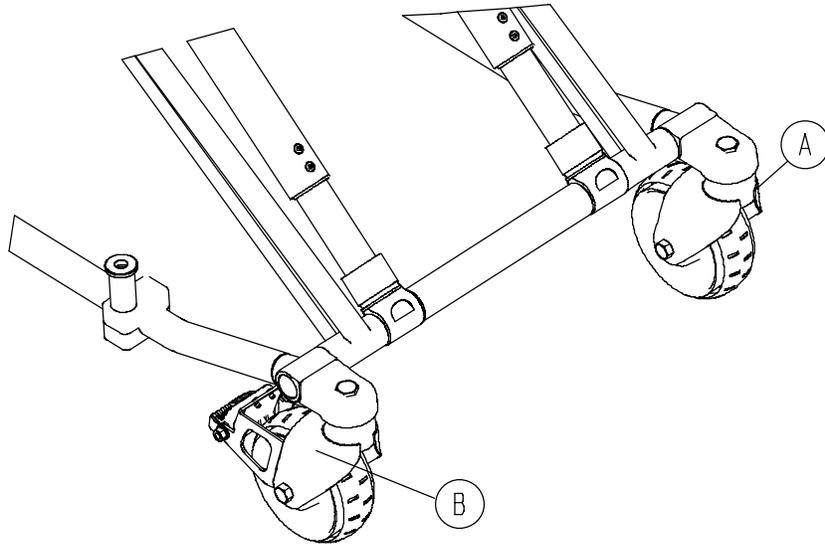

Élément	Numéro	Nom	Quantité
A	6082-002-012	Ensemble de corne de roulette (page 31)	3
B	6082-200-010	Ensemble de blocage de roulette réglable (page 30)	1

Option de blocage de deux roues - 6082-502-010

Rév. B (référence uniquement)

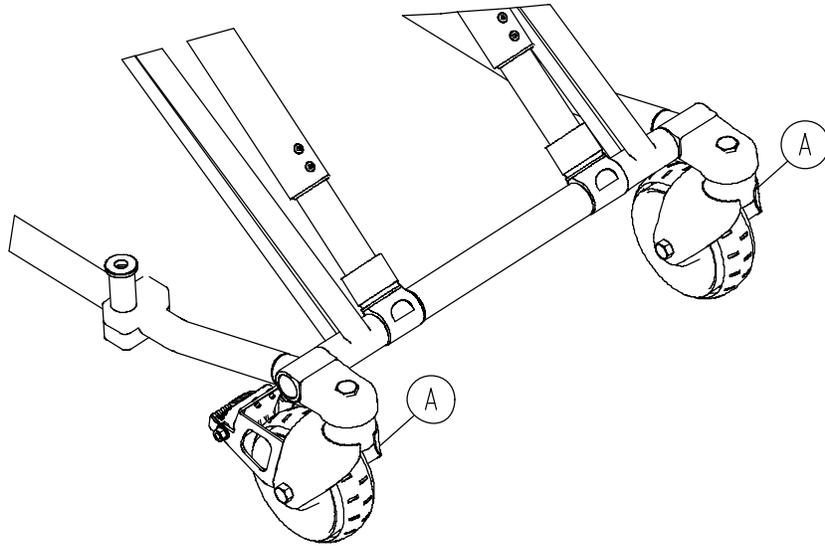

Élément	Numéro	Nom	Quantité
A	6082-200-010	Ensemble de blocage de roulette réglable (page 30)	2
B	6082-002-012	Ensemble de corne de roulette (page 31)	2


Option de blocage de deux roues diagonale - 6082-503-010

Rév. A (référence uniquement)

Élément	Numéro	Nom	Quantité
A	6082-002-012	<i>Ensemble de corne de roulette (page 31)</i>	2
B	6082-200-010	<i>Ensemble de blocage de roulette réglable (page 30)</i>	2

Ensemble de blocage de roulette réglable


6082-200-010 rév. B (référence uniquement)

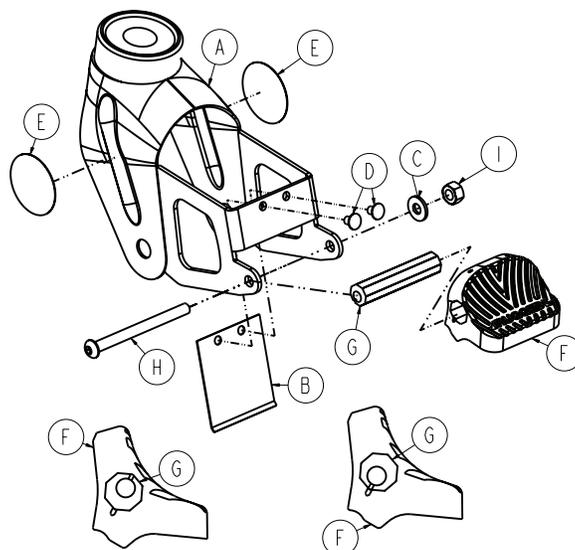

Élément	Numéro	Nom	Quantité
A	6082-100-012	Corne de roulette	1
B	6080-100-032	Ressort	1
C	0011-456-000	Rondelle	1
D	0025-153-000	Rivet semi-tubulaire	2
E	6080-090-101	Étiquette, avertissement	2
F	6080-300-030	Pédale, pédale de blocage de roulette réglable	1
G	6080-200-041	Gaine octogonale, blocage de roulette réglable	1
H	0004-098-000	Vis d'assemblage à tête ronde et douille hexagonale	1
I	0016-118-000	Écrou de verrouillage central	1

Ensemble de corne de roulette


6082-002-012 rév. C (référence uniquement)

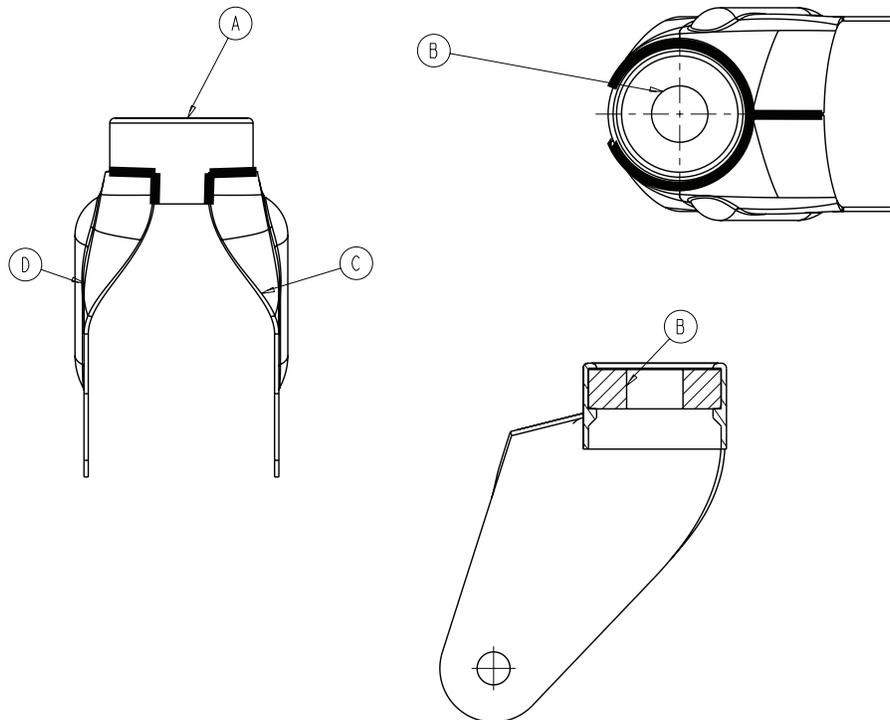

Élément	Numéro	Nom	Quantité
A	6082-002-039	Garde de roulement	1
B	0081-227-000	Roulement	1
C	6082-002-042	Plaque de corne de roulette, côté gauche du patient	1
D	6082-002-043	Plaque de corne de roulette, côté droit du patient	1

Ensemble de barrière latérale


6082-026-010 rév. B (référence uniquement)

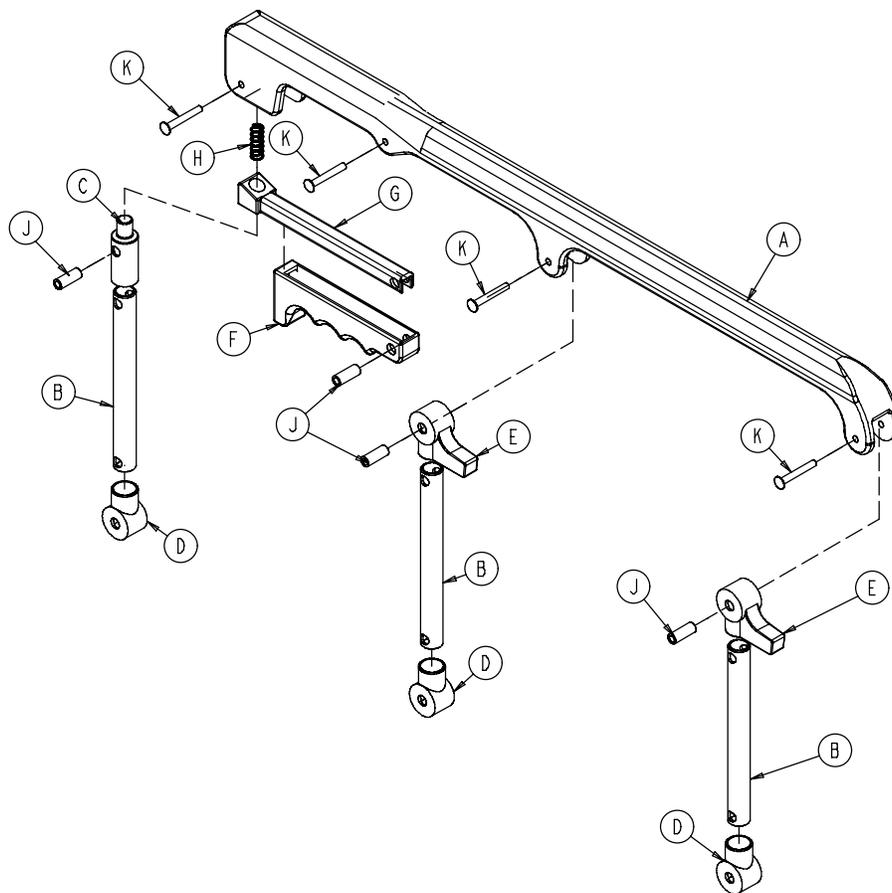


Élément	Numéro	Nom	Quantité
A	6060-025-024	Rail supérieur	1
B	6060-025-043	Montant	3
C	6060-025-047	Verrouillage du montant	1
D	6060-025-041	Pivot du montant	3
E	6060-025-040	Butée du pivot du montant	2
F	6060-025-029	Poignée de libération du verrouillage	1
G	6061-125-030	Pièce coulée de barre de verrouillage	1
H	0038-344-000	Ressort de compression de libération de verrouillage	1
J	6060-025-035	Douille pivotante	4
K	0025-131-000	Rivet	4


Ensemble de tube de levage

608302010020 Rév. AA (référence uniquement)

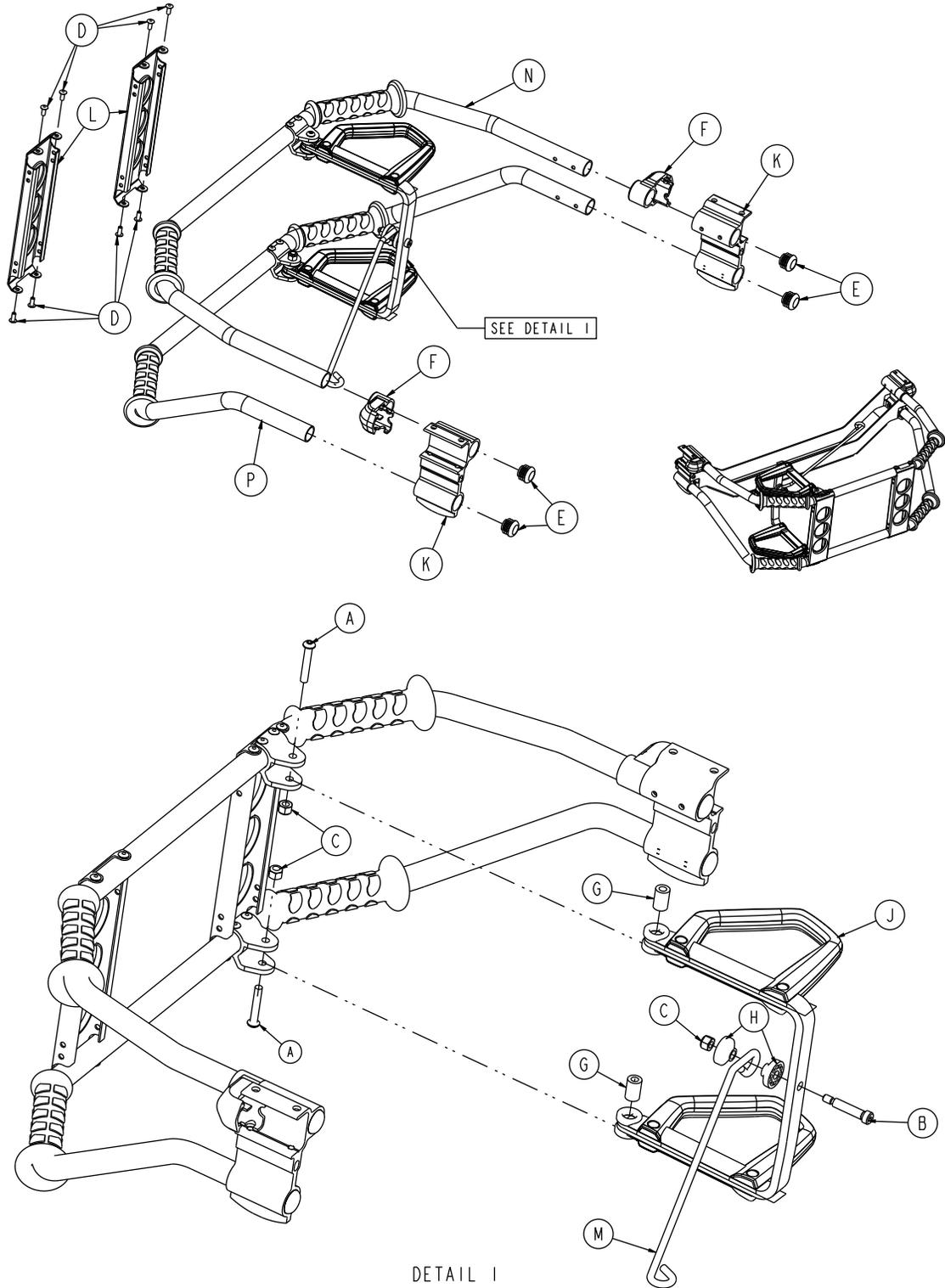

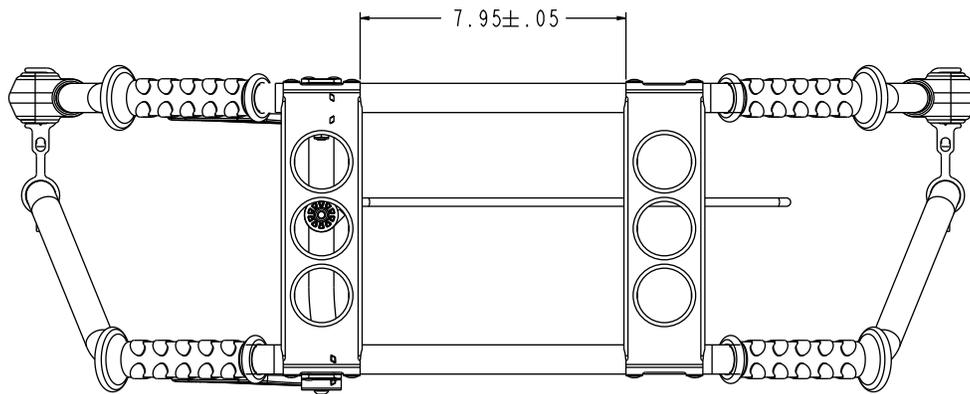

Torque item R
to 10 ft-lb ± 1

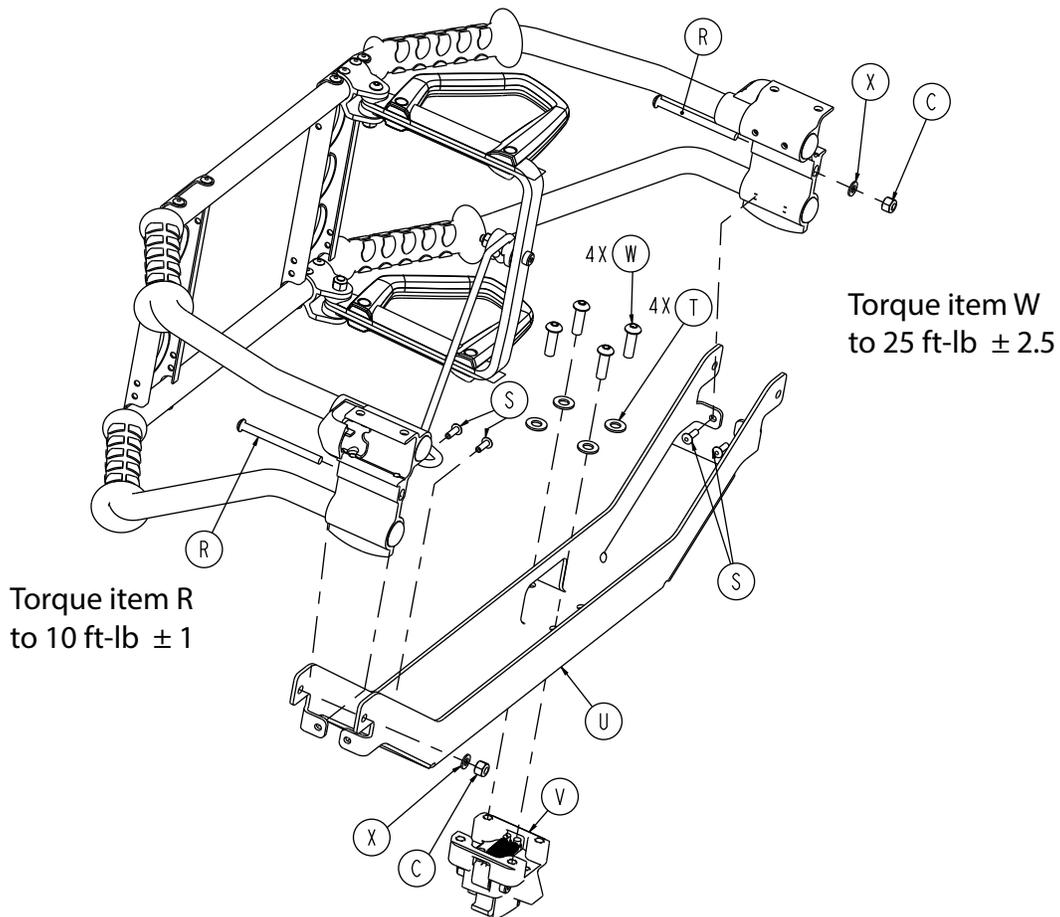

Torque item R
to 10 ft-lb ± 1


Torque item W
to 25 ft-lb ± 2.5

Élément	Numéro	Nom	Quantité
A	0004-135-000	Vis d'assemblage à tête ronde	2
B	0008-033-000	Vis à épaulement à tête creuse	1
C	0016-028-000	Écrou hexagonal Fiberlock	3
D	0025-079-000	Rivet à tête en dôme	12
E	0037-238-000	Obtuteur de tube	4
F	6080-040-012	Capuchon d'extrémité du rail externe, côté pieds	2
G	6080-040-044	Entretoise de libération de liaison	2
H	6082-040-025	Bague de connexion terminale	2

Élément	Numéro	Nom	Quantité
J	6082-040-061	<i>Ensemble de poignée de déblocage, gauche</i> (page 36)	1
K	6082-130-038	Butée du plan de couchage, côté pieds	2
L	6083-001-100	Support de levage	2
M	6083-001-184	Traction de la poignée	1
N	6083-101-023	Ensemble de tube de levage, supérieur	1
P	6083-101-024	Ensemble de tube de levage, inférieur	1
R	0004-098-000	Vis d'assemblage à tête ronde hexagonale	2
S	0025-133-000	Rivet pop à tête bombée	4
T	0011-003-000	Rondelle plate	4
U	608300300015	Ensemble soudé de la fixation côté pieds 6083	1
V	608300300020	<i>Ensemble de fixation modèle 6083</i> (page 43)	1
W	700000715617	Vis d'assemblage à tête ronde	4
X	700001671948	Rondelle	2

Ensemble de poignée de déblocage, gauche


6082-040-061 rév. A (référence uniquement)

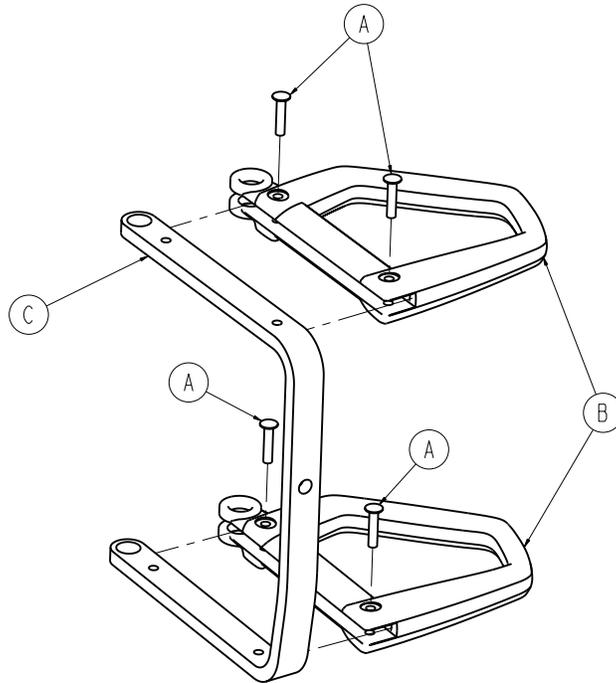




Élément	Numéro	Nom	Quantité
A	0025-127-000	Rivet semi-tubulaire	4
B	6082-001-081	Poignée de débrayage	2
C	6082-140-034	Support de poignée de libération	1


Ensemble de tête détachable

6083-001-028 Rév. AA (référence uniquement)

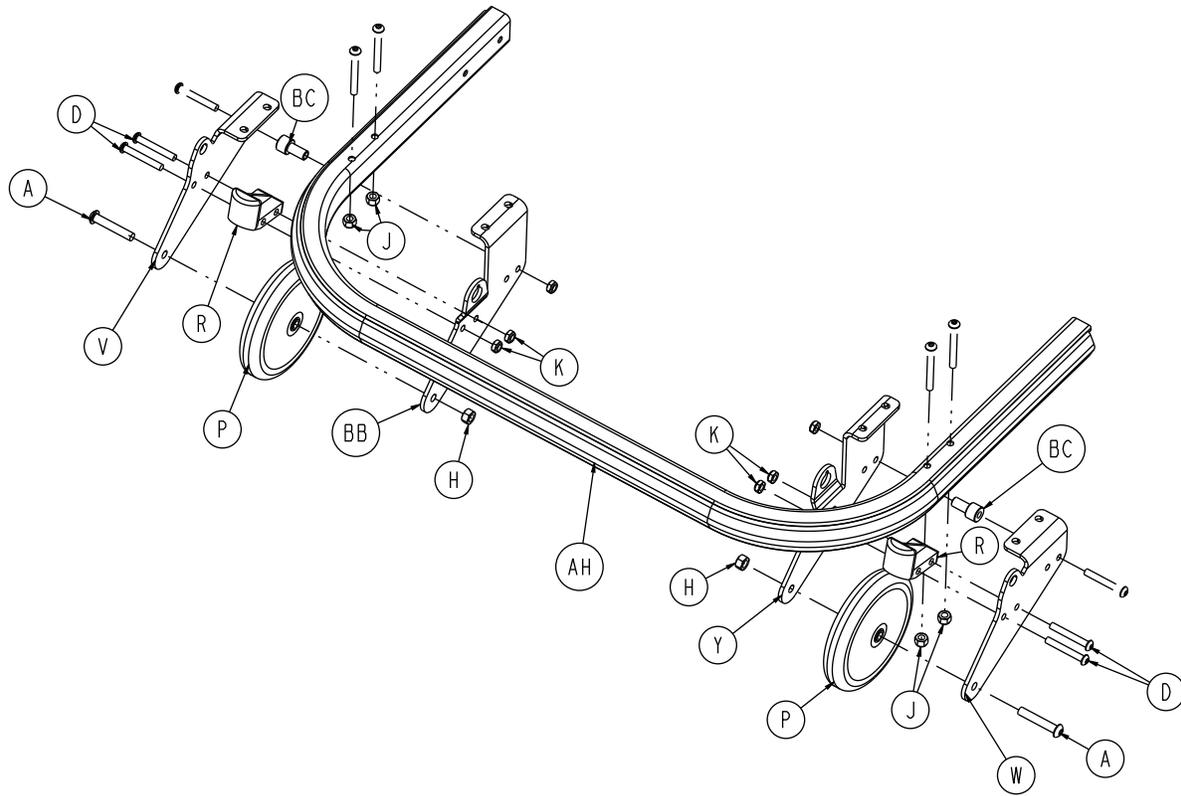

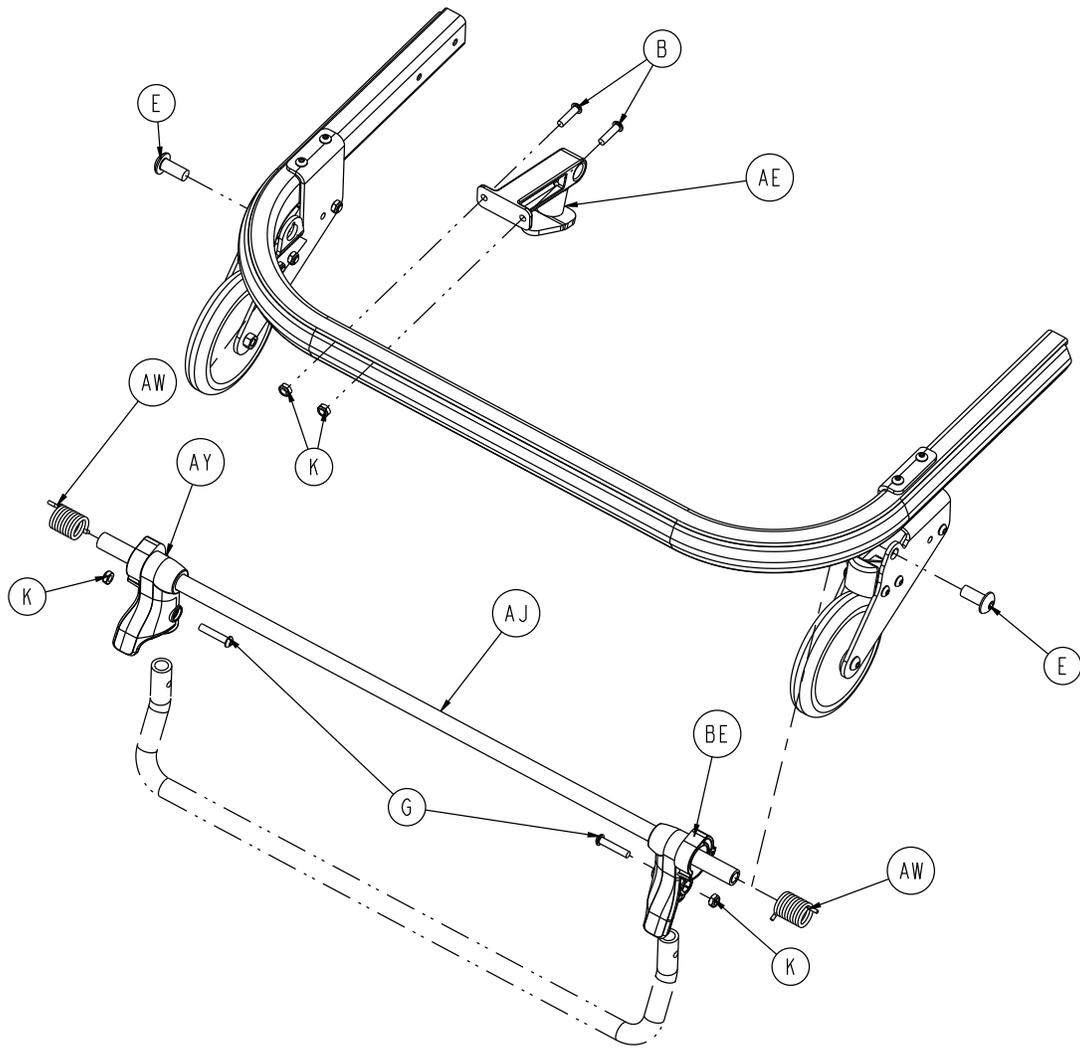

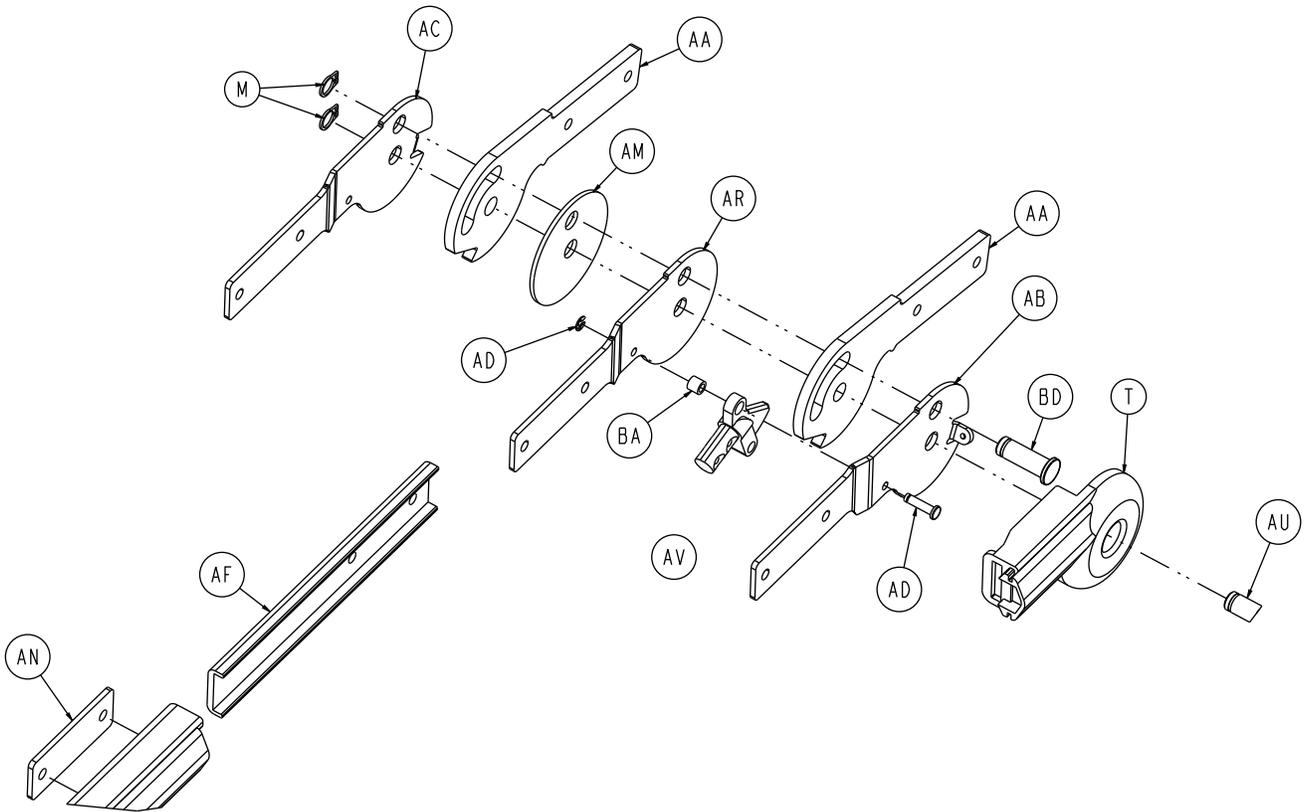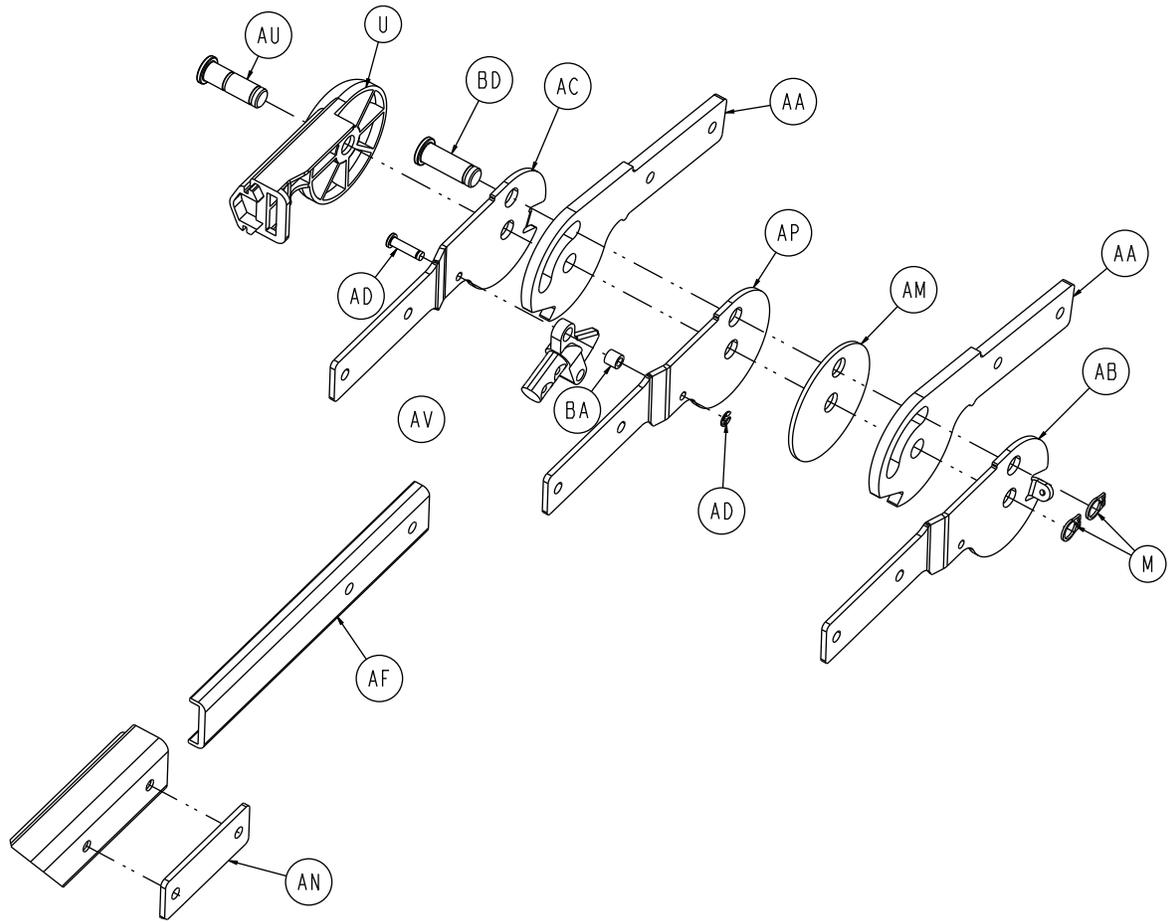

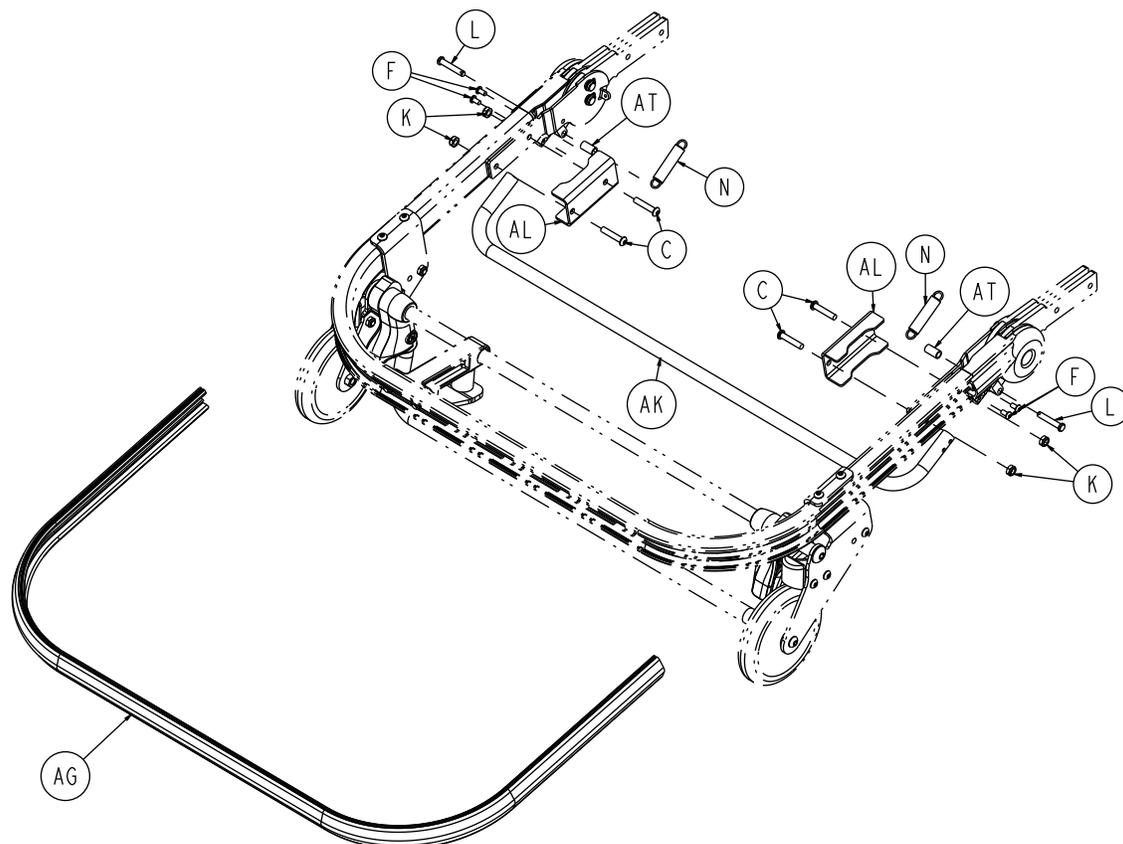


Élément	Numéro	Nom	Quantité
A	0004-054-000	Vis d'assemblage à tête ronde	2
B	0004-197-000	Vis d'assemblage à tête ronde	2
C	0004-198-000	Vis d'assemblage à tête ronde	4
D	0004-204-000	Vis d'assemblage à tête ronde	6
E	0004-209-000	Vis d'assemblage à tête ronde	2
F	0004-231-000	Vis d'assemblage à tête ronde	4
G	0004-612-000	Vis d'assemblage à tête ronde	2
H	0016-020-000	Contre-écrou hexagonal Centerlock	2
J	0016-028-000	Écrou hexagonal Fiberlock	4
K	0016-102-000	Écrou Nylock hexagonal	12
L	0026-273-000	Axe à épaulement	2
M	0028-138-000	Bague de retenue externe	4
N	0038-410-000	Ressort d'extension	2
P	6060-036-020	Ensemble de roue de 5 po	2
R	6060-037-033	Bloc de butée de corne	2
T	6060-037-037	Couvercle du pivot, côté droit	1
U	6060-037-038	Couvercle du pivot, côté gauche	1
V	6080-037-027	Corne de roulette externe, gauche	1
W	6080-037-028	Corne de roulette externe, droite	1
Y	6080-037-030	Corne de roulette interne, droite	1
AA	6082-037-040	Pivot, central	4
AB	6082-037-042	Pivot, forme, droite	2
AC	6082-037-043	Pivot, forme, gauche	2

Élément	Numéro	Nom	Quantité
AD	6082-037-057	Ensemble d'axe à épaulement rainuré	2
AE	6083-001-029	<i>Ensemble de montant à ramure (page 42)</i>	1
AF	6083-001-121	Plaque d'entretoise de pivot de tête détachable	2
AG	6083-001-122	Pare-chocs	1
AH	6083-001-123	Rail externe de la tête de lit détachable	1
AJ	6083-001-124	Tube à pivot pour crochet de sécurité	1
AK	6083-001-125	Barre transversale de déblocage courbée	1
AL	6083-001-126	Support de résistance	2
AM	6083-001-148	Entretoise pivotante détachable	2
AN	6083-001-149	Entretoise de support détachable	2
AP	6083-001-150	Pivot, droit	1
AR	6083-001-151	Pivot, gauche	1
AT	6083-001-156	Entretoise de broche détachable	2
AU	6083-001-157	Goupille de butée du pivot de la tête détachable	2
AV	6090-037-039	Verrouillage de la gâchette	2
AW	6500-001-321	Ressort de torsion de la barre de sécurité	2
AY	6500-002-108	Pivot du crochet de sécurité, gauche	1
BA	6060-037-036	Entretoise de blocage de la gâchette du pivot	2
BB	6080-037-029	Corne de roulette interne, gauche	1
BC	6080-037-049	Entretoise de poignée de déblocage des crochets de sécurité	2
BD	6083-001-155	Goupille de butée du pivot de la tête détachable	2
BE	6500-002-107	Pivot du crochet de sécurité, droit	1

Ensemble de montant à ramure


6083-001-029 rév. A (référence uniquement)

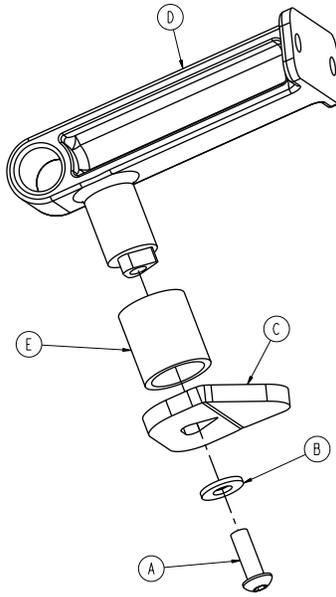

Élément	Numéro	Nom	Quantité
A	0004-161-000	Vis d'assemblage à tête ronde	1
B	0011-077-000	Rondelle	1
C	6083-001-141	Pied de tige de montant à ramure	1
D	6083-001-142	Pièce coulée de montant	1
E	6083-001-143	Protection du montant	1

Ensemble de fixation modèle 6083


608300300020 Rév. AA (référence uniquement)

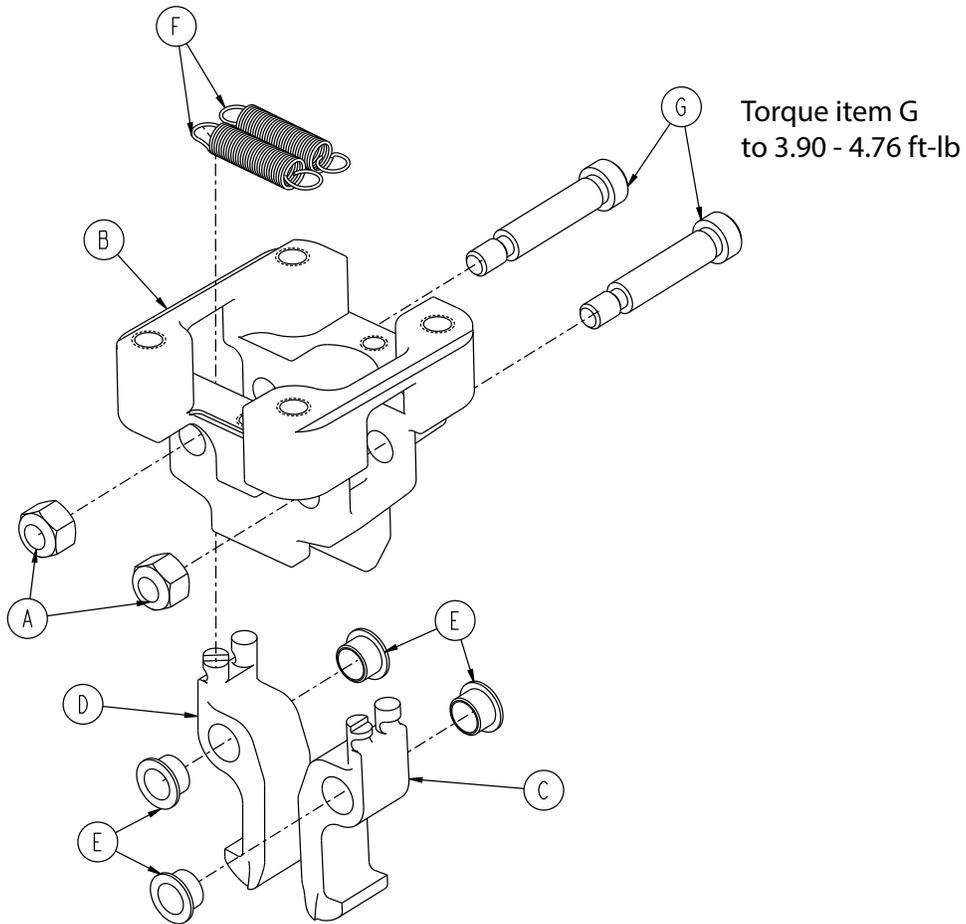

Élément	Numéro	Nom	Quantité
A	0016-028-000	Écrou Nylock hexagonal	2
B	650700020179	Corps de fixation côté pieds	1
C	650700020213	Crochet de fixation côté pieds, côté gauche du patient	1
D	650700020214	Crochet de fixation côté pieds, côté droit du patient	1
E	700000737997	Roulement de bride I-glide	4
F	700000759904	Fil d'extension	2
G	700001682962	Vis à épaulement à tête creuse	2

Ensemble de support de perfusion HAVASU, double, en trois parties


608300360000 Rév. AA (référence uniquement)

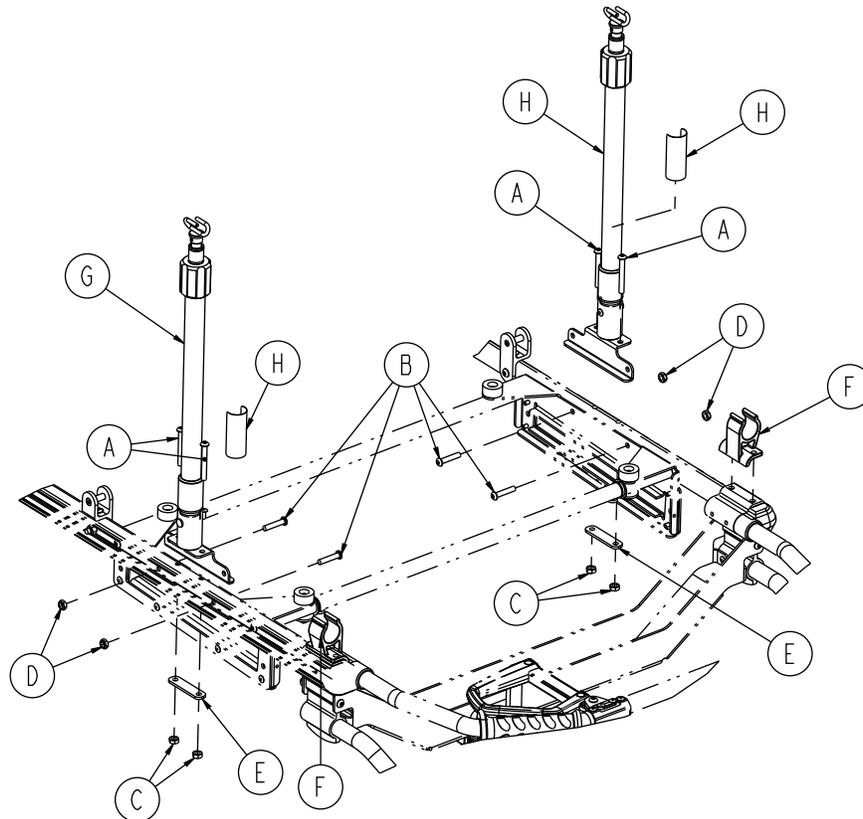

Élément	Numéro	Nom	Quantité
A	0004-097-000	Vis d'assemblage à tête ronde	4
B	0004-198-000	Vis d'assemblage à tête ronde	4
C	0016-078-000	Contre-écrou hexagonal Centerlock	4
D	0016-102-000	Écrou Nylock	4
E	6070-110-032	Plaque de retenue pour perfusion de la civière	2
F	6080-110-035	Clip pour support de perfusion	2
G	6080-216-020	Ensemble de support de perfusion, en trois parties, côté gauche du patient (page 45)	1
H	6080-216-020	Ensemble de support de perfusion, en trois parties, côté droit du patient (page 46)	1
J	608300350903	Étiquette, spécification	2

Ensemble de support de perfusion, en trois parties, côté gauche du patient


6080-216-020 Rév. AA (référence uniquement)

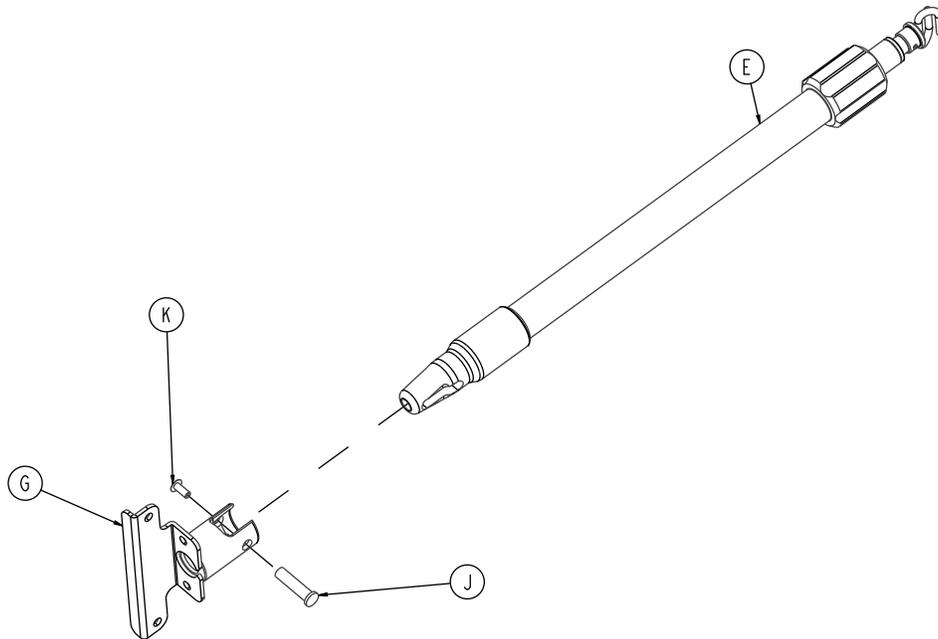

Élément	Numéro	Nom	Quantité
E	6070-215-070	Ensemble de support de perfusion, en trois parties (page 47)	1
G	6080-211-053	Ensemble soudé de la douille de support de perfusion de la civière, côté gauche du patient	1
J	6070-110-037	Broche pivotante pour support de perfusion	1
K	0025-079-000	Rivet à tête en dôme	1

Ensemble de support de perfusion, en trois parties, côté droit du patient


6080-215-020 Rév. AA (référence uniquement)

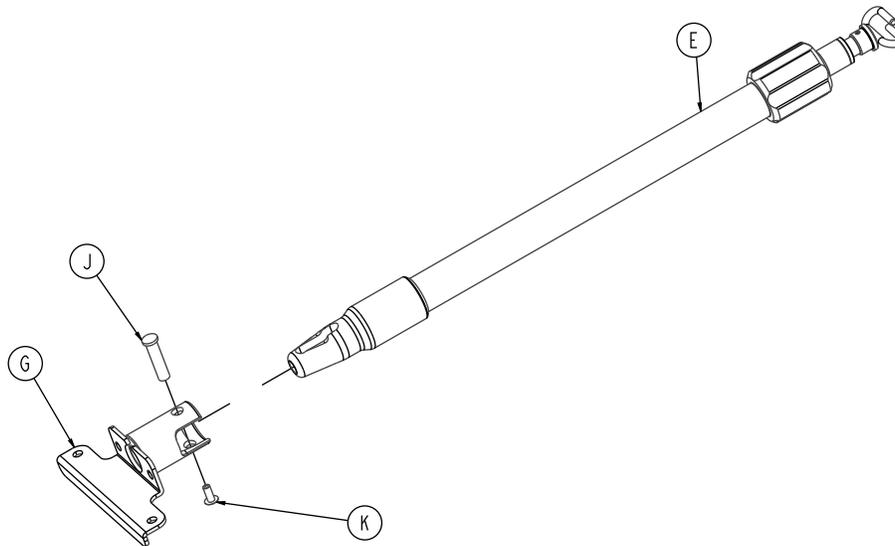

Élément	Numéro	Nom	Quantité
E	6070-215-070	Ensemble de support de perfusion, en trois parties (page 47)	1
G	6080-211-053	Ensemble soudé de la douille de support de perfusion de la civière, côté gauche du patient	1
J	6070-110-037	Broche pivotante pour support de perfusion	1
K	0025-079-000	Rivet à tête en dôme	1

Ensemble de support de perfusion, en trois parties


6070-215-070 rév. AA (référence uniquement)

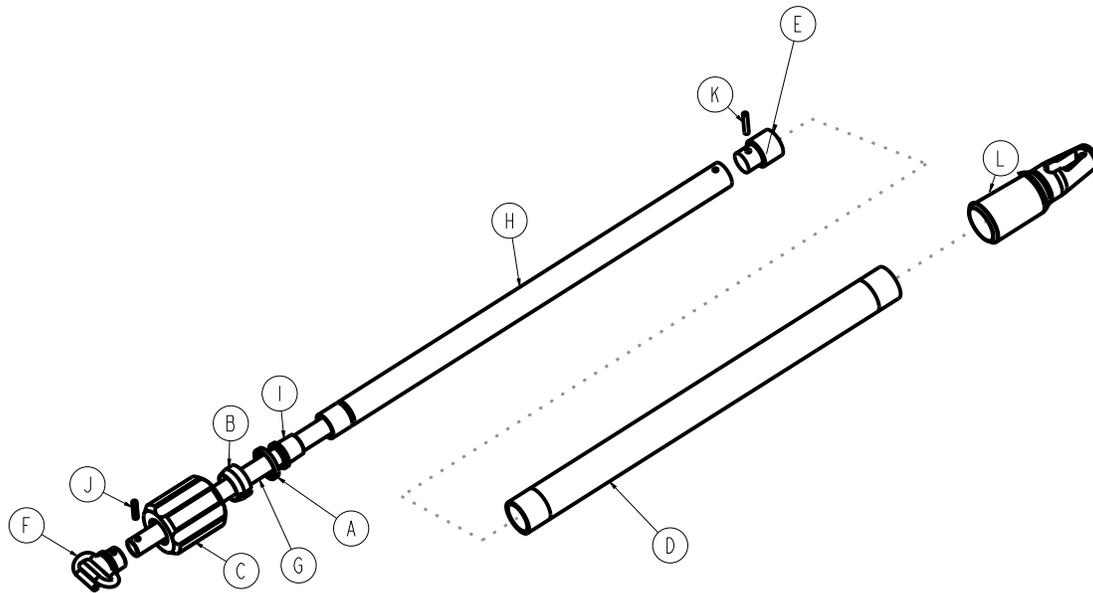

Élément	Numéro	Nom	Quantité
A	1210-110-046	Anneau de secours	1
B	1210-110-047	Anneau de verrouillage	1
C	1210-110-049	Actionneur de support de perfusion (bague de verrouillage)	1
D	6070-210-051	Tube de base, civière à support de perfusion	1
E	6070-110-051	Obturateur coulissant de 2e partie	1
F	6070-110-050	Soudure à crochet, civière à support de perfusion	1
G	6070-115-030	Ensemble de 3e partie, civière à support de perfusion	1
H	6070-115-042	Tube de 2e partie, civière à support de perfusion	1
I	6070-115-045	Bouchon de roulement, support de perfusion	1
J	0026-005-000	Goupille cylindrique	1
K	0026-006-000	Goupille cylindrique	1
L	6070-110-012	Pivot du support de perfusion	1

Porte-bouteille d'oxygène amovible en option - 6080-140-000


6080-140-010 R v. A (r f rence uniquement)

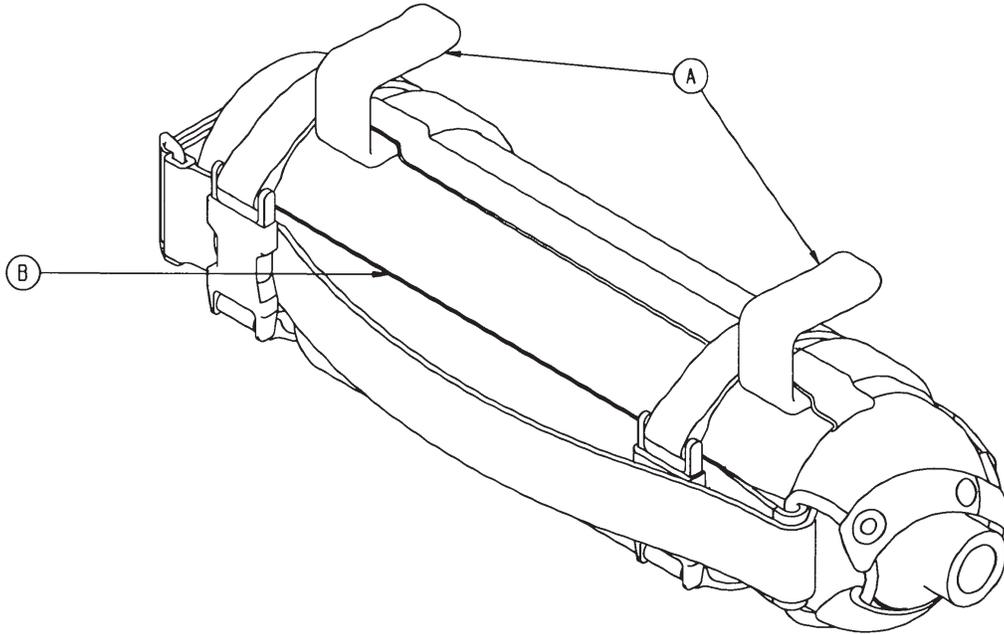

�l�ment	Num�ro	Nom	Quantit�
A	6080-140-011	Support de porte-bouteille d'oxyg�ne	2
B	6080-140-012	Porte-bouteille d'oxyg�ne	1

Porte-bouteille d'oxygène en option, côté pieds - 6070-140-000


6070-140-010 Rév. D (référence uniquement)

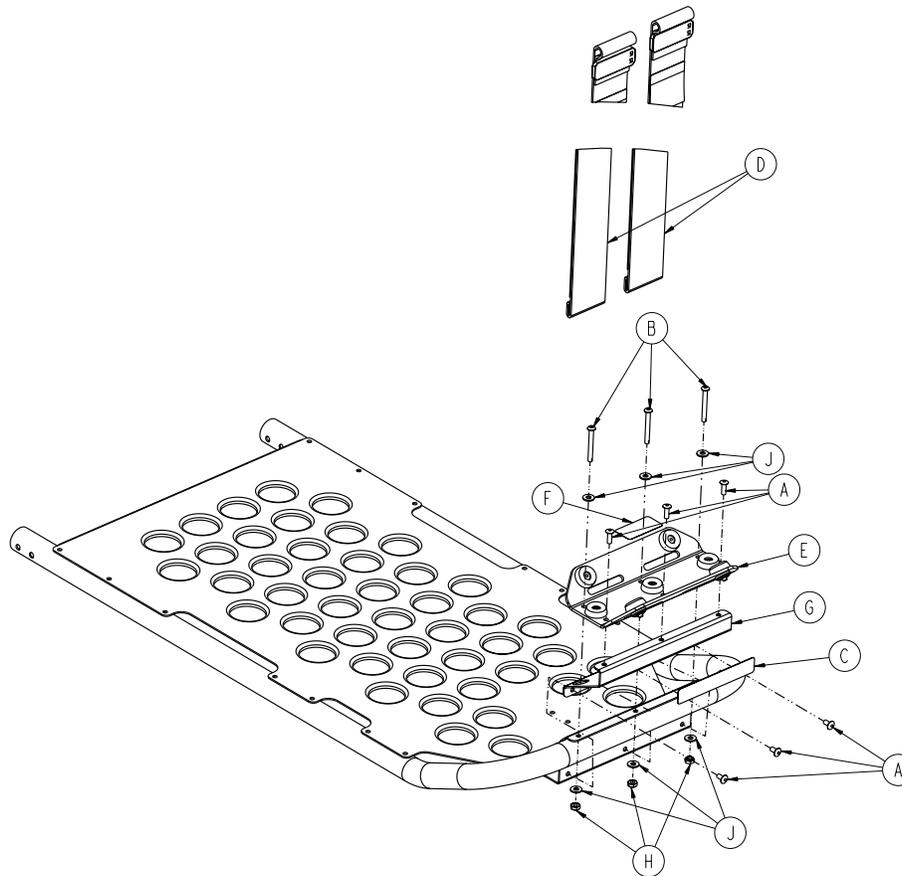

Élément	Numéro	Nom	Quantité
A	0025-079-000	Rivet	6
B	0004-862-000	Vis d'assemblage à tête ronde	3
C	6080-090-109	Étiquette, avertissement	1
D	6060-140-013	Ensemble de sangle	2
E	6060-140-020	Ensemble de plateau support de bouteille d'oxygène, côté pieds (page 51)	1
F	6070-090-014	Étiquette, caractéristiques techniques du porte-bouteille d'oxygène	1
G	6070-140-017	Support de soutien	1
H	0016-131-000	Écrou Nylock hexagonal	3
J	0011-001-000	Rondelle	6

Sans porte-bouteille d'oxygène en option, côté pieds - 6082-141-000


Rév. A (référence uniquement)

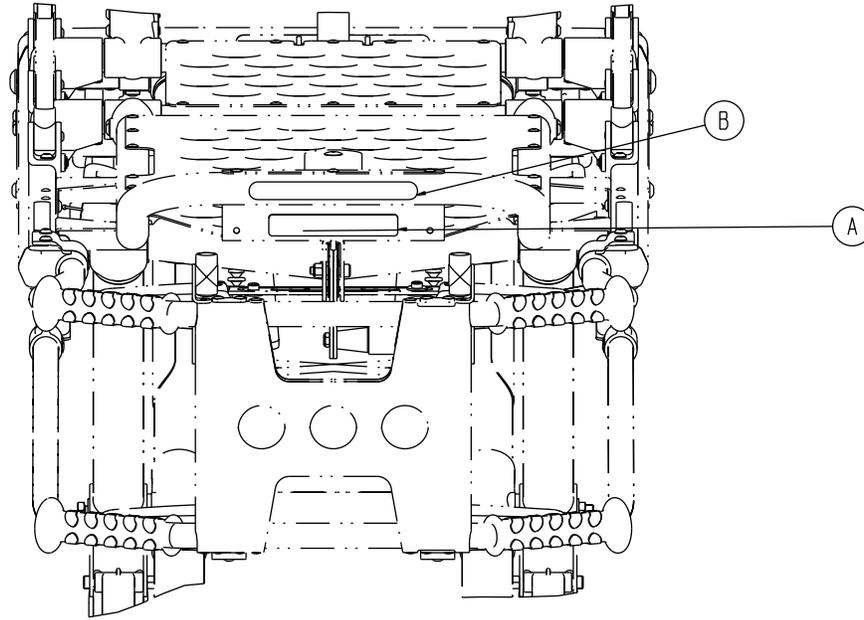

Élément	Numéro	Nom	Quantité
A	6080-090-109	Étiquette, avertissement, international	1
B	6060-090-004	Étiquette, RUGGED , petite	1

Ensemble de plateau support de bouteille d'oxygène, côté pieds


6060-140-020 rév. C (référence uniquement)

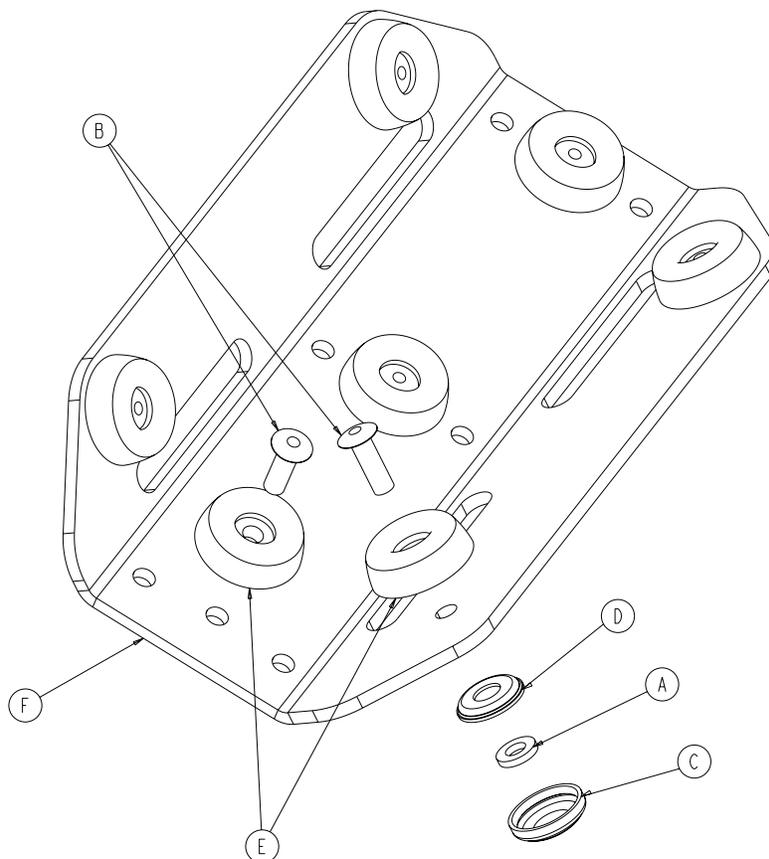

Élément	Numéro	Nom	Quantité
A	0011-436-000	Rondelle	4
B	0025-133-000	Rivet aveugle	7
C	0037-055-000	Capuchon de protection noir	4
D	0037-056-000	Rondelle de retenue	4
E	0946-001-155	Pare-chocs	7
F	6060-140-015	Plateau du support de bouteille d'oxygène	1

Ensemble de remorquage - 6083-039-000


Rév. C (référence uniquement)

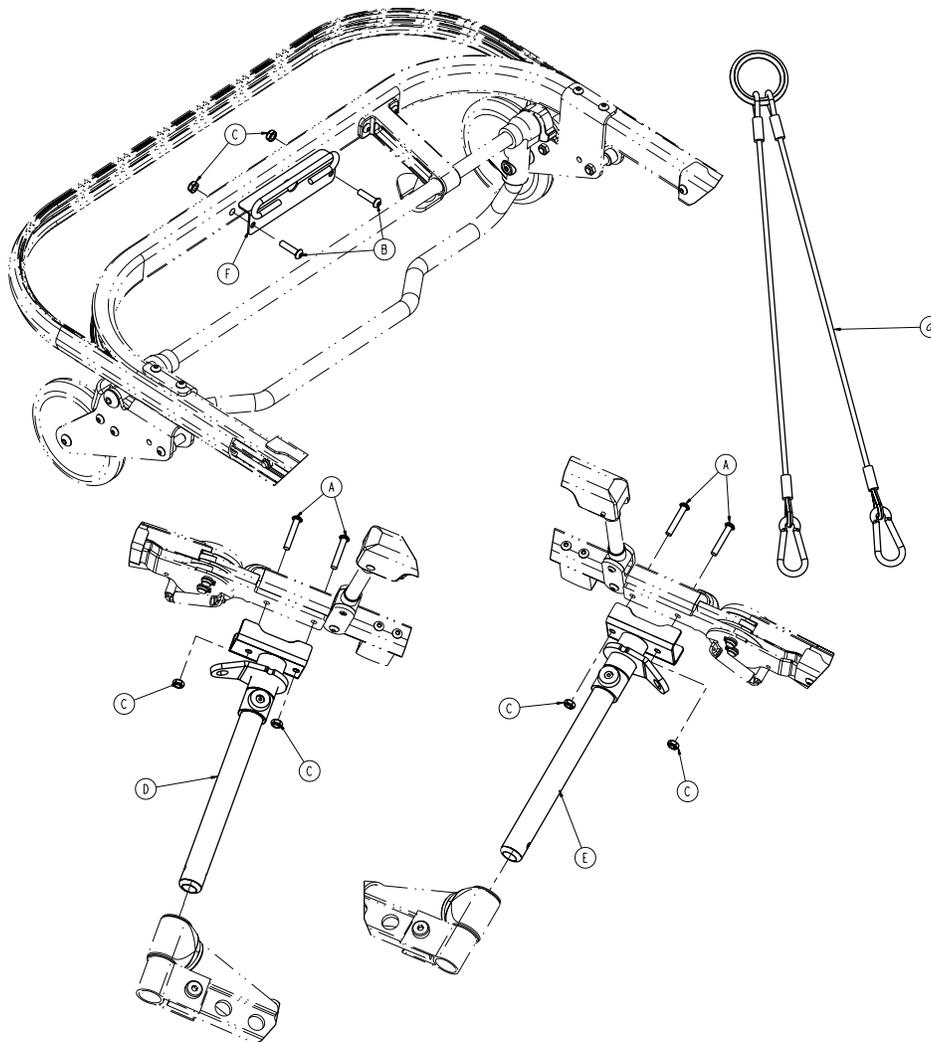

Élément	Numéro	Nom	Quantité
A	0004-135-000	Vis d'assemblage à tête ronde	4
B	0004-197-000	Vis d'assemblage à tête ronde	2
C	0016-102-000	Écrou hexagonal Nylock	6
D	6083-001-036	Ensemble plan de couchage/adaptateur de base, gauche (page 55)	1
E	6083-001-037	Ensemble plan de couchage/adaptateur de base, droit (page 56)	1
F	6083-001-070	Support de boucle de faisceau de remorquage	1
G	6083-001-215	Faisceau de remorquage	1

Ensemble plan de couchage/adaptateur de base, gauche


6083-001-034 rév. C (référence uniquement)

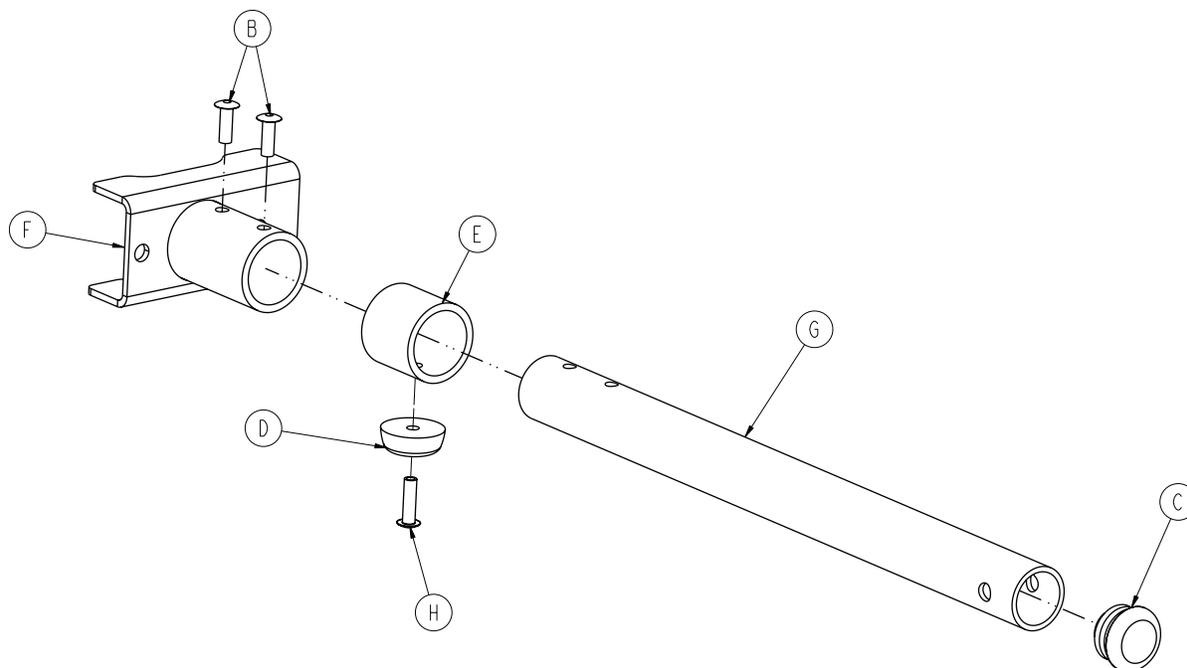

Élément	Numéro	Nom	Quantité
B	0025-133-000	Rivet de la tête du dôme	2
C	0037-225-000	Obturateur de tube	1
D	0946-001-155	Pare-chocs	1
E	6082-205-060	Gaine d'entretoise de l'adaptateur du plan de couchage/de la base	1
F	6083-001-071	Adaptateur du plan de couchage/de la base, gauche	1
G	6083-001-152	Tube pivotant de l'adaptateur du plan de couchage/de la base	1
H	0025-086-000	Rivet de la tête du dôme	1

Ensemble plan de couchage/adaptateur de base, droit


6083-001-035 rév. C (référence uniquement)

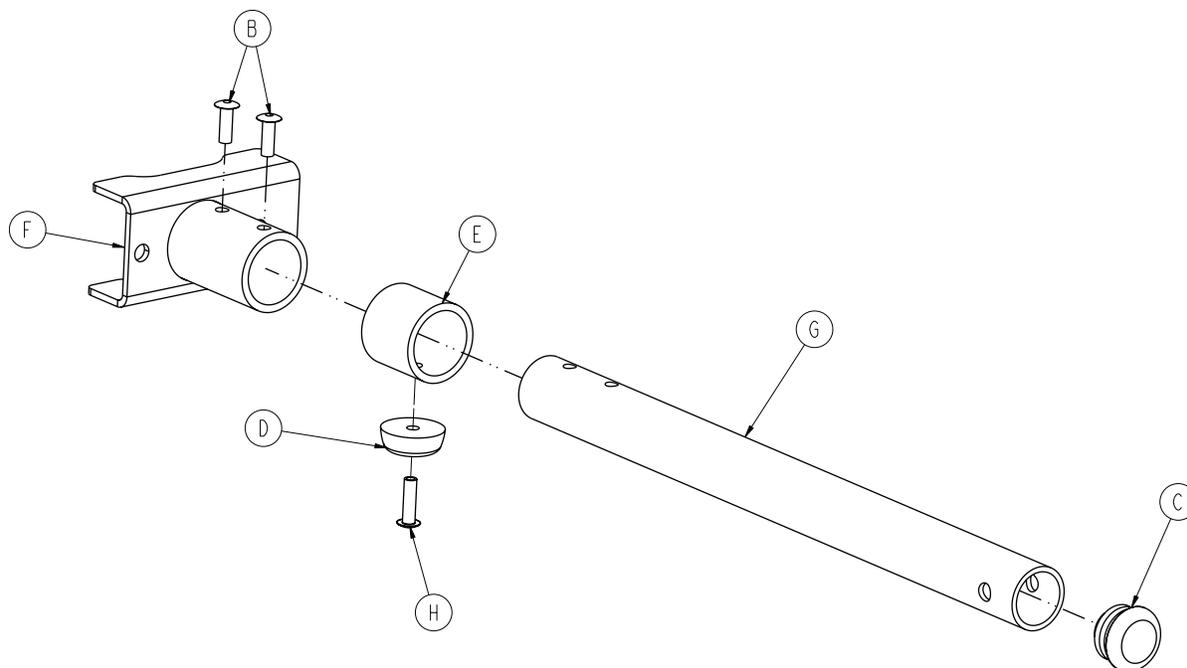

Élément	Numéro	Nom	Quantité
B	0025-133-000	Rivet de la tête du dôme	2
C	0037-225-000	Obtuteur de tube	1
D	0946-001-155	Pare-chocs	1
E	6082-205-060	Gaine d'entretoise de l'adaptateur du plan de couchage/de la base	1
F	6083-001-072	Adaptateur de plan de couchage/base, droit	1
G	6083-001-152	Tube pivotant de l'adaptateur du plan de couchage/de la base	1
H	0025-086-000	Rivet de la tête du dôme	1

Ensemble plan de couchage/adaptateur de base, gauche


6083-001-036 rév. C (référence uniquement)

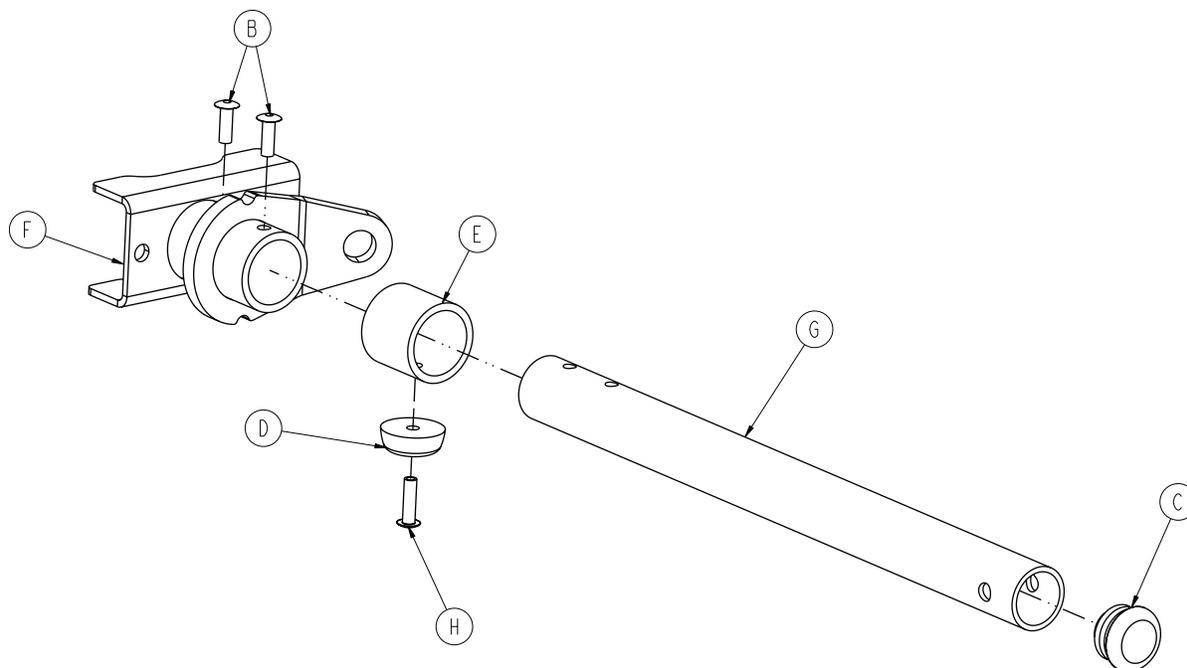

Élément	Numéro	Nom	Quantité
B	0025-133-000	Rivet de la tête du dôme	2
C	0037-225-000	Obtuteur de tube	1
D	0946-001-155	Pare-chocs	1
E	6082-205-060	Gaine d'entretoise de l'adaptateur du plan de couchage/de la base	1
F	6083-001-073	Adaptateur du plan de couchage/de la base, gauche	1
G	6083-001-152	Tube pivotant de l'adaptateur du plan de couchage/de la base	1
H	0025-086-000	Rivet de la tête du dôme	1

Ensemble plan de couchage/adaptateur de base, droit


6083-001-037 rév. C (référence uniquement)

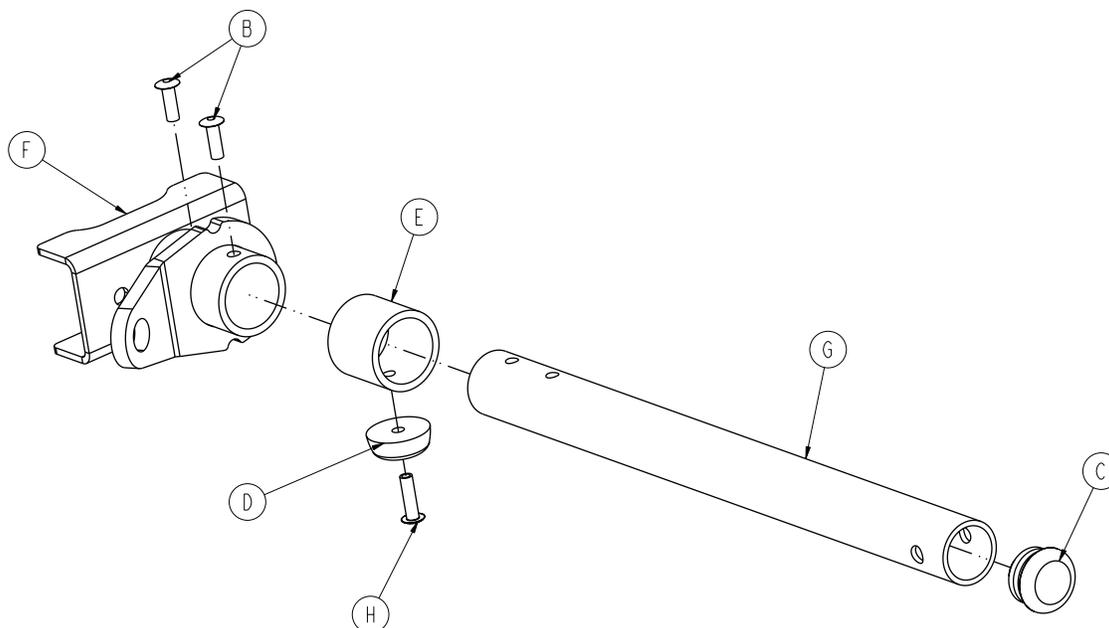

Élément	Numéro	Nom	Quantité
B	0025-133-000	Rivet de la tête du dôme	2
C	0037-225-000	Obturateur de tube	1
D	0946-001-155	Pare-chocs	1
E	6082-205-060	Gaine d'entretoise de l'adaptateur du plan de couchage/de la base	1
F	6083-001-074	Adaptateur de plan de couchage/base, droit	1
G	6083-001-152	Tube pivotant de l'adaptateur du plan de couchage/de la base	1
H	0025-086-000	Rivet de la tête du dôme	1

Poignée de poussée/traction en option - 6083-040-000


Rév. AA (référence uniquement)

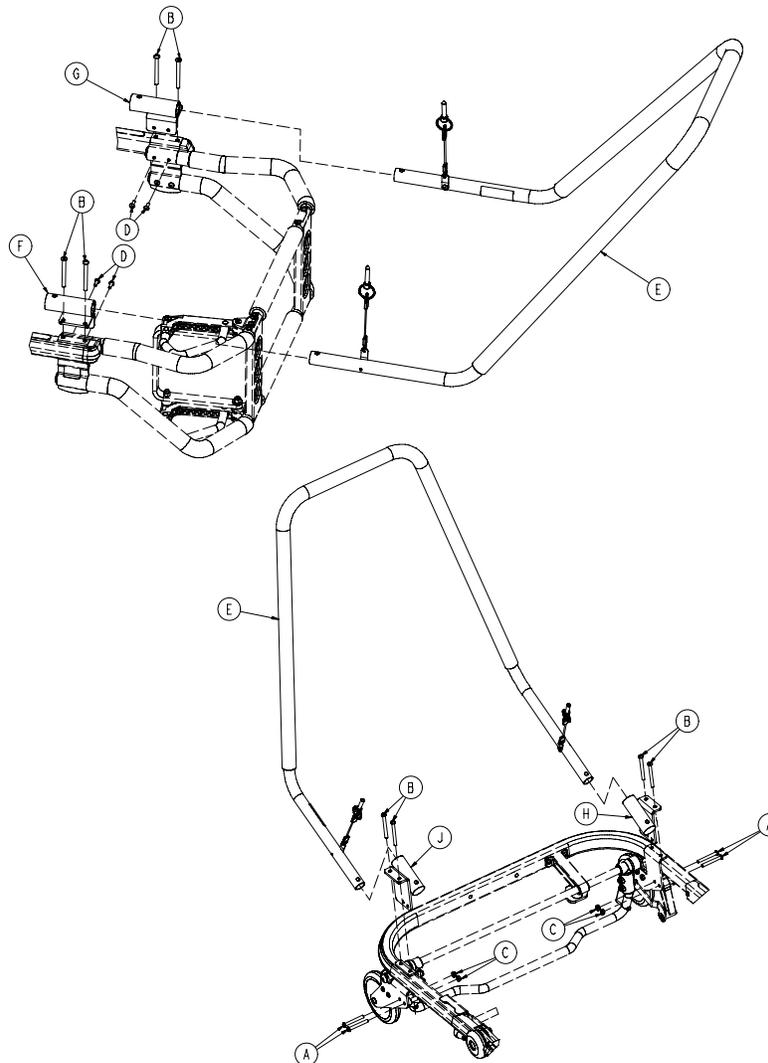

Élément	Numéro	Nom	Quantité
A	0004-097-000	Vis d'assemblage à tête ronde	4
B	0004-234-000	Vis d'assemblage à tête ronde	8
C	0016-078-000	Écrou de verrouillage central	4
D	0025-133-000	Rivet	4
E	6083-001-038	Ensemble barre de poussée/traction (page 58)	2
F	6083-001-064	Douille de la poignée de traction, côté pieds, droite	1
G	6083-001-065	Douille de la poignée de traction, côté pieds, gauche	1
H	6083-001-066	Douille de la poignée de traction, côté tête, gauche	1
J	6083-001-067	Douille de la poignée de traction, côté tête, droite	1

Ensemble barre de poussée/traction


6083-001-038 rév. A (référence uniquement)

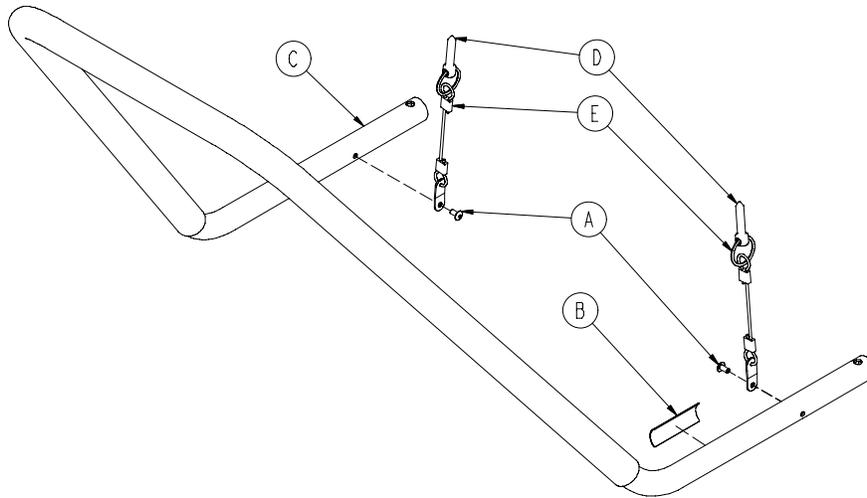

Élément	Numéro	Nom	Quantité
A	0025-079-000	Rivet de la tête du dôme	2
B	6083-001-167	Étiquette, barre de poussée/traction	1
C	6083-001-170	Poignée de poussée/traction	1
D	6083-001-175	Broche de poignée de poussée/traction	2
E	6083-001-176	Anneau de cordon	2

Crochet de sécurité avec capacité de levage en option - 6083-042-000


Rév. AA (référence uniquement)

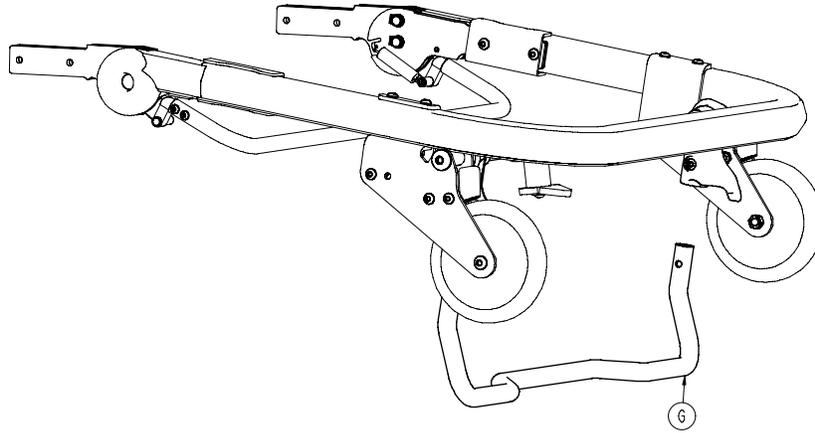

Élément	Numéro	Nom	Quantité
G	6083-001-230	Barre de sécurité détachable	1

Poignée de levage latérale en option - 6083-041-000

Rév. A (référence uniquement)

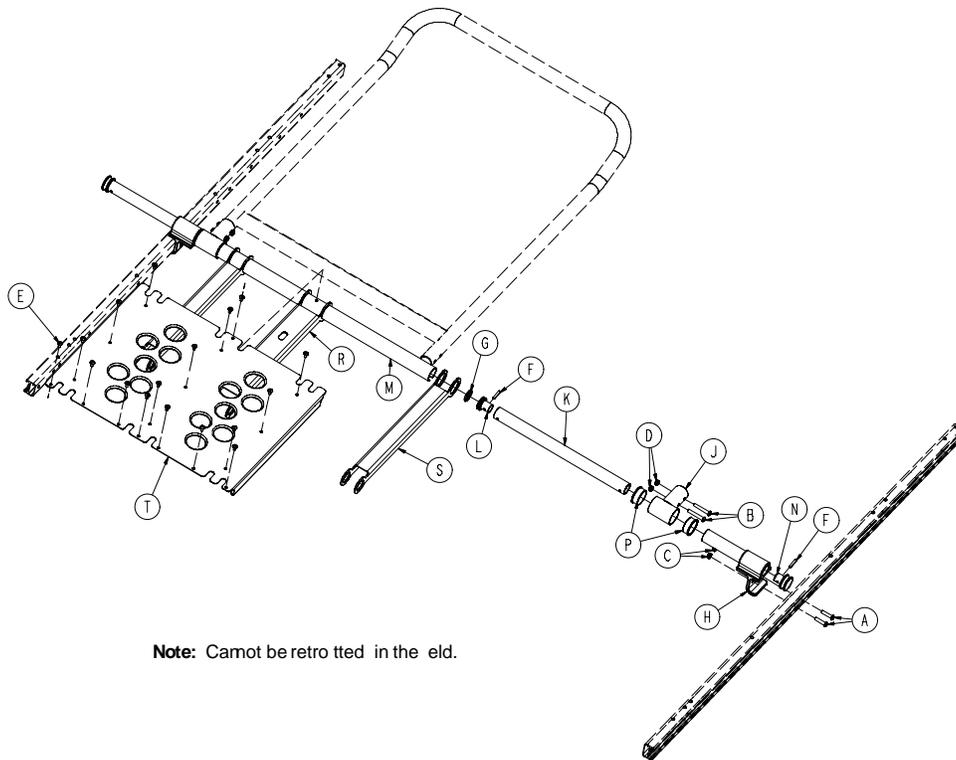


Note: Cannot be retro fited in the eld.

Élément	Numéro	Nom	Quantité
A	0004-135-000	Vis d'assemblage à tête ronde	4
B	0004-198-000	Vis d'assemblage à tête ronde	4
C	0016-028-000	Écrou Nylock	4
D	0016-102-000	Écrou Nylock	4
E	0025-079-000	Rivet	14
F	0026-311-000	Goupille cylindrique	4
G	0045-999-607	Joint torique	2
H	6083-001-068	Support de butée de la poignée de levage latérale	2
J	6083-001-069	Pivot en T	2
K	6083-001-205	Tube télescopique à poignée de levage latérale	2
L	6083-001-206	Obturateur de la poignée de levage latérale	2
M	6083-001-207	Tube externe de la poignée de levage latérale	1
N	6083-001-208	Obturateur de la poignée de levage latérale	2
P	6083-001-211	Roulement de bride	4
R	6083-001-212	Support central de section médiane	1
S	6083-001-213	Support externe de section médiane	2
T	6083-001-214	Peau de section médiane	1

Ensemble de protection du cadre en X en option - 6080-145-000


6082-150-012 rév. AA (référence uniquement)

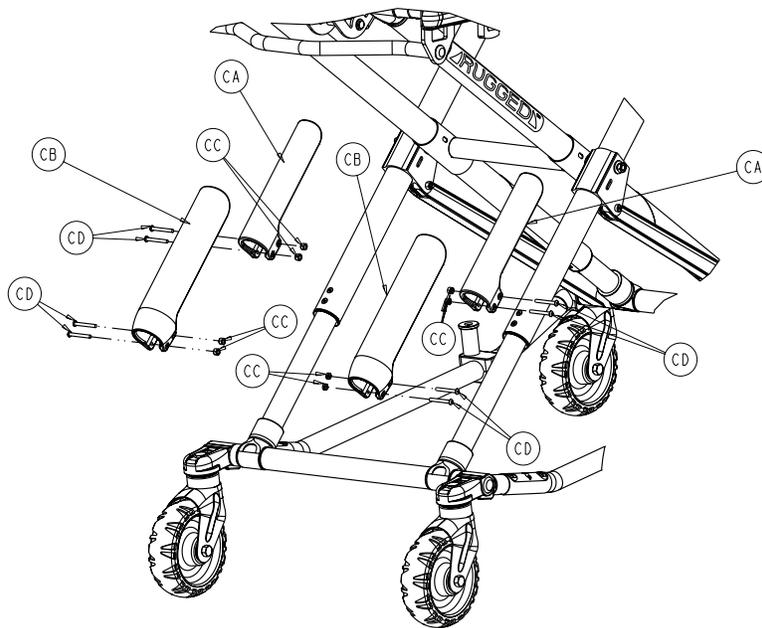

Élément	Numéro	Nom	Quantité
CA	6080-145-001	Protège-cadre en X, supérieur	2
CB	6080-145-002	Protège-cadre en X, inférieur	2
CC	0016-003-000	Écrou hexagonal	8
CD	0004-508-000	Vis d'assemblage à tête ronde	8



Matelas, transport bariatrique en option - 6083-028-000

Rév. A (référence uniquement)

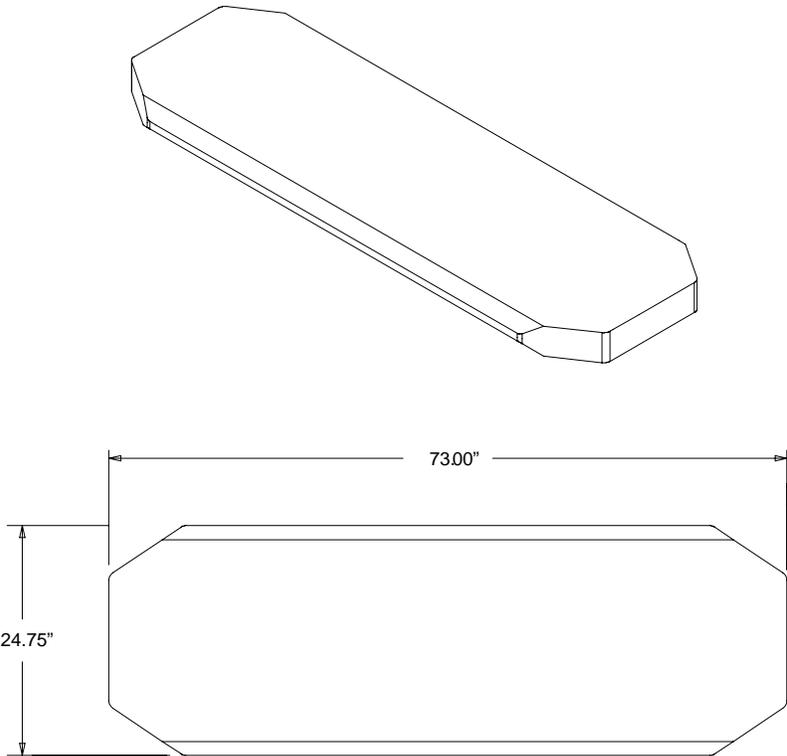


Poche de rangement côté tête - 6083-001-202

Rév. D (référence uniquement)

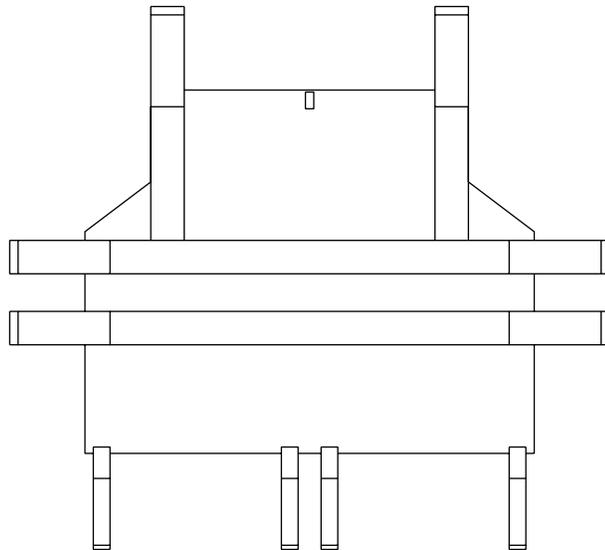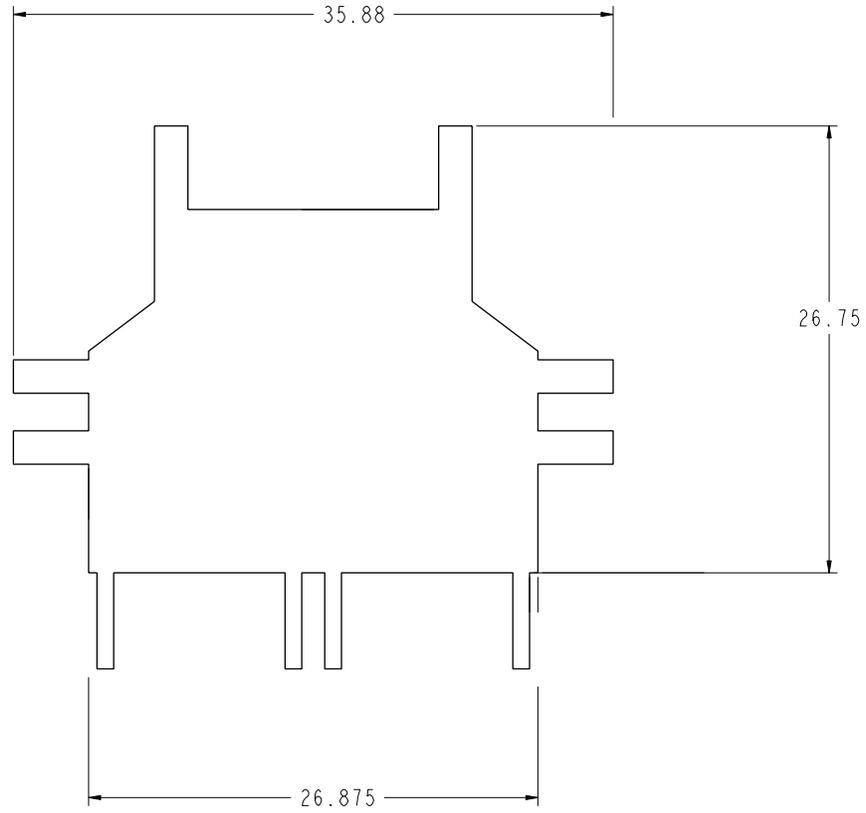

Plateau de rangement en option, base - 6083-027-000


Rév. B (référence uniquement)

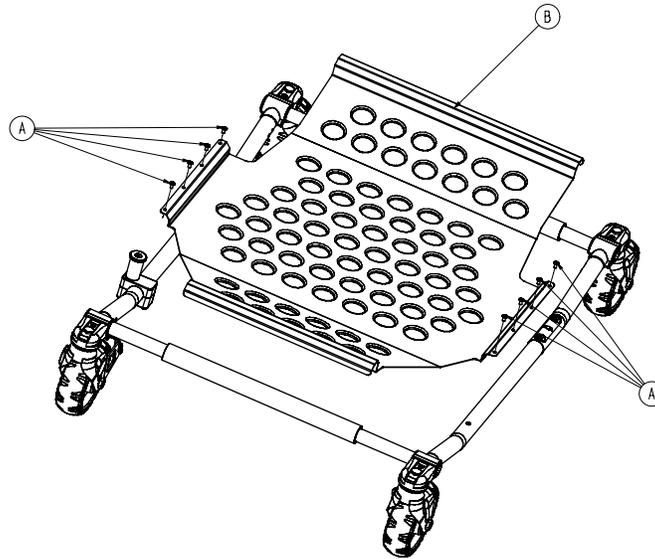

Élément	Numéro	Nom	Quantité
A	0025-079-000	Rivet à tête en dôme	8
B	6083-001-160	Plateau de rangement de la base	1


Sangle de sécurité patient en option - 6083-001-201

Rév. B (référence uniquement)

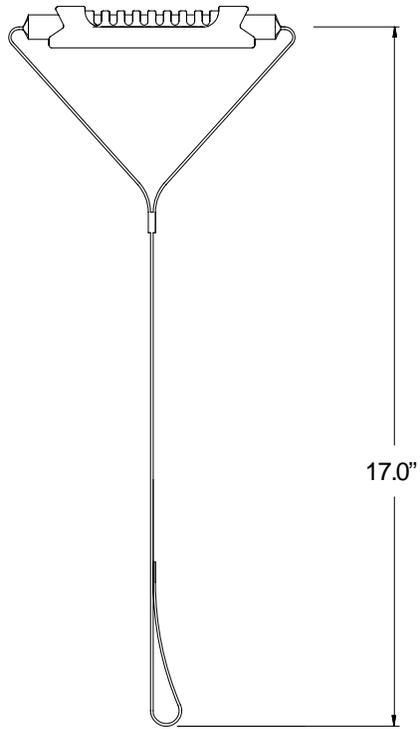

Extension de ceinture en option - 6082-160-050

Rév. C (référence uniquement)

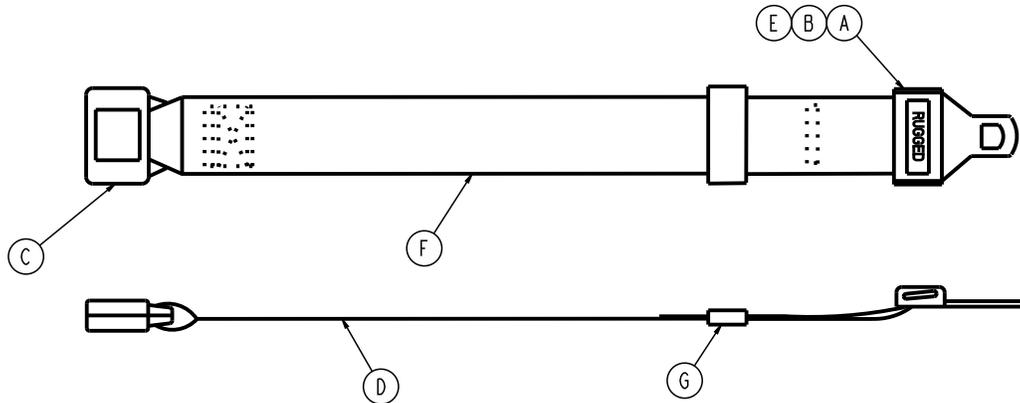

Élément	Numéro	Nom	Quantité
A		Langue (Intertek réf. 2122681)	
B		Capuchon (Intertek réf. 2122525)	
C		Boucle (Intertek réf. 2122682)	
D	6082-090-001	Étiquette, rallonge de ceinture	1
E	6060-090-011	Étiquette, RUGGED	1
F		Ceinture, 2 po de large, noire	
G		Dispositif de retenue de ceinture	

Stryker Corporation or its divisions or other corporate affiliated entities own, use or have applied for the following trademarks or service marks: **HAVASU, MX-PRO, Power-LOAD, RUGGED, Stryker**. All other trademarks are trademarks of their respective owners or holders.



Stryker Medical
3800 E. Centre Avenue
Portage, MI 49002
USA