

Civière Power-PRO IT

Manuel d'entretien

REF 6516



Table des matières

Définition de « Avertissement », « Mise en garde » et « Remarque »	3
Résumé des précautions de sécurité	3
Resulted ues prevautions de securite	
Points de pincement possibles	<u>ə</u>
Introduction à l'entretien	
Durée de vie utile prévue	5
Informations de contact	5
Emplacement du numéro de série - Power-PRO	5
Emplacement du numéro de série – SMRT	5
Entretien préventif	
Lubrification	
Inspection et réglages réguliers	
Tous les mois ou toutes les deux heures d'utilisation	
Tous les mois ou toutes les deux neures à utilisation.	0
Tous les trois mois ou toutes les six heures d'utilisation .	<u>/</u>
Tous les six mois ou toutes les 12 heures d'utilisation	7
Tous les 12 mois ou toutes les 24 heures d'utilisation	8
Fiche d'entretien	9
Documentation sur la formation	10
Dépannage	
Localisateur des systèmes électronique et hydraulique	11
Localisateur des Systemes electronique et nyuraunque	40
Ensemble hydraulique	
Schémas de câblage de l'ensemble hydraulique	12
Schéma fonctionnel du système électrique - déchargement	13
Schéma fonctionnel du système électrique - chargement	13
Le voyant d'alimentation du chargeur SMRT n'est pas allumé	14
Le chargeur SMRT ne charge pas le SMRT Pak	14
Les voyants du chargeur SMRT ne sont pas allumés lorsque le Pak est inséré	15
Un SMRT Pak complètement chargé ne fournit pas une puissance suffisante pour le fonctionnement de la civière	
Le chargeur indique un délai de température (voyant orange clignotant), mais le Pak se trouve dans la plage de température de fonctionnement	13
normale	15
Le chargeur SMRT indique une erreur du SMRT Pak (voyant orange), mais le Pak fonctionne bien sur la civière	
Dérive du plan de couchage (sans le poids du patient)	
Dérive du châssis (sans le poids du patient)	16
Le plan de couchage ne s'abaisse pas en mode motorisé	16
Le plan de couchage ne se déploie pas en mode motorisé	
Le châssis ne se rétracte pas en mode motorisé	16
Le châssis ne se déploie pas en mode manuel	17
Le criassis ne se depluie pas en mode manuel	17
Le châssis ne se rétracte pas en mode manuel	17
Le plan de couchage ne se rétracte pas en mode manuel (avec le poids du patient)	17
Le plan de couchage ne se déploie pas en mode manuel	17
La rétraction rapide ne s'enclenche pas	17
Codes d'erreur de l'écran LCD - micro principal	17
Micro de sécurité	
Câble avec connecteur principal	
Schémas de câblage du câble principal	10
Scrientas de cablage du cable principal	19
Carte de commande	20
Schémas de câblage de la carte de commande	21
Entretien	
Remplacement de la section tête	22
Réglage manuel du câble de déblocage	22
Remplissage du réservoir de l'ensemble hydraulique	
Réglage de la force de verrouillage des roues.	23
Réglage du mécanisme Steer-Lock	24
Réglage du montant de retenue de la civière	
Remplacement du montant de retenue de la civière	
Remplacement des vis du montant de retenue de la civière	
Remplacement de la valve hydraulique A ou B	
Remplacement de la valve de déblocage manuelle hydraulique	27
Remplacement du vérin hydraulique	
Remplacement du tuyau hydraulique	
Remplacement du bloc terminal	
Remplacement des fusibles du câble automobile 12 V CC	
Ensemble civière	
Ensemble châssis	
Ensemble de corne de roulette	
Ensemble verrouillage de roulette réglable	
Ensemble de roue moulée de 6 po	
Roue de chargement, rigide	
Roue, avant	
Option Steer-Lock, aucune - 6506-037-000	47
Option Steer-Lock, addate - 0300-037-000	
Sous-ensemble Steer-Lock, côté tête	
Ensemble tube de levage externe, pivot du châssis	50
Ensemble tube de levage interne, pivot du châssis.	
Tube de levage interne, pivot du plan de couchage, ensemble côté droit du patient	
Tube de levage interne, pivot du plan de couchage, ensemble côté gauche du patient	
Sous-ensemble rail externe, côté droit du patient.	54
Saus anaemble rail outerne, câté gauche du nationt	E

Ensemble capteurs Hall	56
Ensemble boîtier du capteur	57
Ensemble centrale électrique	58
Sous-ensemble hydraulique	60
Ensemble côté pieds	61
Ensemble traverse	65
Ensemble bouton	66
Option de section tête pour crochet à ramure uniquement - 6516-043-000	67
Option compatible avec Power-LOAD - 6516-144-000	69
Option Performance-LOAD - 6516-034-001	71
Options Power-LOAD et Performance-LOAD - 6516-034-002	73
Section tête (non compatible avec Power-LOAD) en option - 6506-001-020	76
Section tête (compatible avec Power-LOAD) en option - 6506-001-021	77
Section tête en option - 6500-002-020	78
Section tête avec crochet à ramure uniquement, courbée en option - 650600020020	80
Raccordement de la section tête	
Ensemble de verrouillage de la section tête	83
Ensemble dispositif d'arrêt des fixations internes en option - 6500-001-027	84
Porte-bouteille d'oxygène en option pour la section tête, aucun - 6506-036-000	85
Ensemble de fixation côté pieds (compatible avec Power-LOAD)	86
Montant de retenue de civière en option, côté droit du patient - 6085-033-000	89
Ensemble incubateur côte à côte Airborne en option - 6516-128-000	90
Adaptateur pour incubateur, côte à côte Airborne	91
Ensemble extension - 6510-001-018	
Orager® empilable en option - 6516-129-000	94
Ensemble Drager® prolongé en option - 6516-141-000	95
Ensemble adaptateur pour incubateur - Drager®	96
Ensemble empilable Airborne en option - 6516-127-000	99
Ensemble adaptateur pour incubateur - empilable Airborne	
Ensemble adaptateur en option, chariot pneumatique, aucun - 6516-142-000	102
Barre de poussée en option - 6550-040-000	
Ensemble poignée d'angle en option - 6550-001-026	104
Compartiment de rangement, côté tête en option - 6500-128-000	
Filet de rangement du châssis en option- 6500-160-000	106
Bloc-batterie en option, SMRT - 6500-033-000	107
Crochet de sécurité, court - 6060-036-017/Crochet de sécurité, long - 6060-036-018/Crochet de sécurité, J - 6092-036-018	108
nformations relatives à la CEM	109
Passeport de recyclage	112
650600010016	112
5500-002-028	
5500-102-015	114
5500-101-214	
5500-002-159	116
5500-201-148	117
5500-201-010	118
S500-101-010	119

Définition de « Avertissement », « Mise en garde » et « Remarque »

Les termes AVERTISSEMENT, MISE EN GARDE et REMARQUE ont une signification particulière et doivent faire l'objet d'une lecture attentive.

AVERTISSEMENT

Avertit le lecteur d'une situation qui, si elle n'est pas évitée, pourrait entraîner la mort ou des blessures graves. Peut également attirer l'attention sur l'existence potentielle d'effets indésirables graves ou de risques d'accident.

MISE EN GARDE

Avertit le lecteur d'une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, peut causer des blessures mineures ou modérées à l'utilisateur ou au patient ou endommager le matériel en question ou d'autres biens. Couvre notamment les précautions à prendre afin d'assurer l'utilisation sûre et efficace du dispositif et d'éviter les dommages qui pourraient découler de l'usage ou du mésusage du matériel.

Remarque - Fournit des informations spécifiques destinées à faciliter l'entretien ou à clarifier des instructions importantes.

Résumé des précautions de sécurité

Toujours lire et respecter scrupuleusement les avertissements et les mises en garde indiqués sur cette page. Tout entretien doit être effectué exclusivement par du personnel qualifié.

AVERTISSEMENT

- Toujours éloigner les mains des pivots rouges de la barre de sécurité lors du chargement ou déchargement de la civière ou lors du réglage de la hauteur.
- Toujours libérer la pression avant de déconnecter les conduites hydrauliques ou d'autres conduites. Du liquide sous pression qui s'échappe peut pénétrer dans la peau et causer des blessures graves. Serrer tous les raccords avant d'appliquer une pression. En cas d'accident, consulter un médecin immédiatement.
- Ne pas utiliser les mains nues pour inspecter des fuites hydrauliques.

MISE EN GARDE

- · Toujours utiliser des pièces agréées pour éviter tout risque d'endommagement du produit.
- Toujours inspecter les tuyaux et conduites régulièrement pour éviter d'endommager la civière. Inspecter et serrer les raccords desserrés. Les conduites hydrauliques, les tuyaux et les raccords peuvent être défectueux ou ils peuvent se desserrer après avoir subi des dommages physiques, s'ils se tordent, s'ils vieillissent et s'ils sont exposés à l'environnement.
- Ne pas basculer la civière sur ses roues porteuses et actionner le produit, étant donné que ceci permettra à l'air de pénétrer dans le système hydraulique
- Ne pas lubrifier les paliers dans le cadre en X, car cela réduirait la performance de la civière et pourrait annuler sa garantie.
- Le montant de retenue de la civière est livré préconfiguré pour une civière à cadre en X. Si la fixation a été configurée pour une civière à cadre en H, ajuster le montant de retenue pour l'adapter à la fixation.
- Cet équipement n'est pas destiné à être utilisé dans des environnements résidentiels et peut ne pas fournir une protection adéquate à la réception radio dans de tels environnements.

Points de pincement possibles

AVERTISSEMENT - Toujours éloigner les mains des pivots de la barre de sécurité rouge lors du chargement ou déchargement de la civière ou lors du réglage de la hauteur.

FR 3 6516-009-007 Rev AB.0

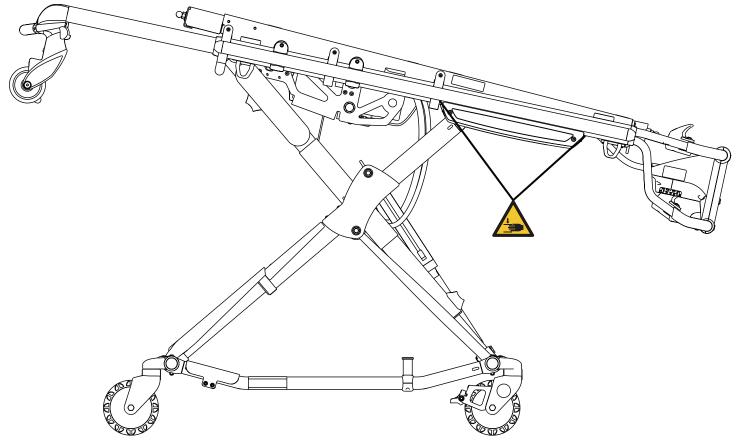


Figure 1 – Points de pincement possibles

6516-009-007 Rev AB.0 4 FR

Introduction à l'entretien

Ce manuel vous aide à entretenir le produit Stryker concerné. Lire ce manuel pour entretenir ce produit. Ce manuel ne traite pas du fonctionnement de ce produit. Consulter le manuel d'utilisation pour les instructions d'utilisation. Pour consulter le manuel d'utilisation ou le manuel d'entretien en ligne, aller sur le site https://techweb.stryker.com/.

Durée de vie utile prévue

Le Power-PRO a une durée de vie utile prévue de sept ans dans des conditions d'utilisation normales et en respectant la maintenance périodique appropriée.

Le chargeur SMRT a une durée de vie utile prévue de sept ans dans des conditions d'utilisation normale et en respectant la maintenance périodique appropriée.

La batterie SMRT Pak a une durée de vie utile prévue de deux ans dans des conditions normales d'utilisation.

Informations de contact

Contacter le service clientèle ou le support technique de Stryker au : 1-800-327-0770.

Strvker Medical

3800 E. Centre Avenue

Portage, MI 49002

États-Unis

Pour consulter votre mode d'emploi ou votre manuel d'entretien en ligne, rendez-vous sur https://techweb.stryker.com/.

Avoir le numéro de série (A) du produit Stryker à disposition avant d'appeler le service clientèle ou le support technique de Stryker. Inclure le numéro de série dans toutes les communications écrites.

Emplacement du numéro de série - Power-PRO

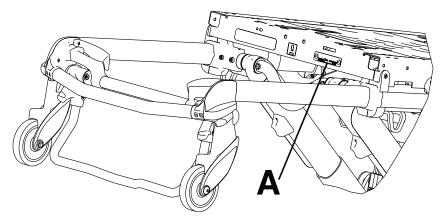


Figure 2 - Emplacement du numéro de série

Emplacement du numéro de série - SMRT

Le numéro de série du chargeur **SMRT** est situé sur le fond de l'unité. Le numéro de lot du **SMRT** Pak est situé sur le dessus du **SMRT** Pak, au-dessus du bouton rouge de déblocage.

FR 5 6516-009-007 Rev AB.0

Entretien préventif

AVERTISSEMENT

- Toujours libérer la pression avant de déconnecter les conduites hydrauliques ou d'autres conduites. Du liquide sous pression qui s'échappe peut pénétrer la peau et causer des blessures graves. Serrer tous raccords avant d'appliquer une pression. En cas d'accident, consulter un médecin immédiatement
- Ne pas utiliser les mains nues pour inspecter des fuites hydrauliques.

MISE EN GARDE

- Toujours utiliser des pièces agréées pour éviter tout risque d'endommagement du produit.
- Toujours inspecter les tuyaux et conduites régulièrement pour éviter d'endommager la civière. Inspecter et serrer les raccords desserrés. Les
 conduites hydrauliques, les tuyaux et les raccords peuvent être défectueux ou ils peuvent se desserrer après avoir subi des dommages physiques, s'ils
 se tordent, s'ils vieillissent et s'ils sont exposés à l'environnement.
- Ne pas basculer la civière sur ses roues porteuses et actionner le produit, étant donné que ceci permettra à l'air de pénétrer dans le système hydraulique.

Définir et respecter un calendrier d'entretien et conserver la trace des activités d'entretien. Mettre le produit hors service avant d'effectuer les vérifications d'entretien préventif. Il peut être nécessaire d'effectuer les vérifications de maintenance préventive plus fréquemment en fonction du degré d'utilisation du produit. Toute réparation doit être effectuée exclusivement par du personnel qualifié.

Lors de l'utilisation de produits d'entretien, suivre les instructions du fabricant et consulter toutes les fiches de données de sécurité (FDS).

Lubrification

MISE EN GARDE - Ne pas lubrifier les paliers dans le cadre en X, car cela réduirait les performances de la civière et pourrait annuler sa garantie.

La civière a été conçue pour fonctionner sans devoir être lubrifiée.

Inspection et réglages réguliers

Le calendrier suivant est un guide général de maintenance. Des facteurs comme la météo, le terrain, la position géographique et l'utilisation individuelle peuvent modifier le calendrier de maintenance requis. En cas de doutes sur la façon d'effectuer ces vérifications, contacter un technicien de Stryker. En cas de doutes quant aux intervalles à respecter pour la maintenance du produit, contacter un technicien de Stryker. Effectuer chaque contrôle de routine et, au besoin, remplacer les pièces usées.

Tous les mois ou toutes les deux heures d'utilisation

Inspecter ces éléments tous les mois ou toutes les deux heures de fonctionnement du moteur, à la première échéance.

Élément	Inspecter
Paramètres	Configuration du dispositif d'arrêt des fixations internes
Vérin	Déployer la tige du vérin. Essuyer la tige du vérin avec un chiffon doux et un nettoyant ménager.
Câbles et fils	Pas de fils pendants provenant des connexions et des chemins de câbles
Poignée de déblocage de secours manuelle	Fonctionnement de la poignée de déblocage de secours manuelle
Plan de couchage	Cadre et plan de couchage
Base	Cadre et base
Roues	Fixation, roulement et pivotement corrects de toutes les roues
Section tête	Fonctionnement de la barre de sécurité. Tirer en direction de la section tête pour s'assurer que la barre de sécurité bascule et tourne librement et revient à sa position initiale
Batterie	Le boîtier du SMRT Pak et la zone des bornes sont exempts de fissures ou d'endommagement avant la première utilisation et avant chaque utilisation
Chargeur	Le chargeur SMRT et ses pièces sont exempts de coupures au niveau du cordon, de broches ou de contacts tordus, ou de fissures au niveau du boîtier avant la première et avant chaque utilisation

6516-009-007 Rev AB.0 6 FR

Tous les trois mois ou toutes les six heures d'utilisation

Inspecter ces éléments tous les trois mois ou toutes les six heures de fonctionnement du moteur, à la première échéance.

Élément	Inspecter	
Vérin	Toutes les attaches sont correctement fixées	
	Aucune fuite de fluide hydraulique (rouge)	
	Raccords desserrés - serrer si nécessaire	
Système hydraulique	Installation correcte de toutes les fixations du support du moteur	
	Aucune fuite de fluide hydraulique	
	Aucune fuite du réservoir	
Câbles et fils	Pas de détérioration ou de pincement du faisceau de câblage, de câble ou de conduites	
	Aucun connecteur endommagé	
Poignée de déblocage de secours manuelle	La base s'allonge et se rétracte quand l'opérateur tire la poignée de déblocage de secours manuelle	
	Avec une charge de 100 lb (45 kg) ou plus, la civière ne s'abaisse pas lorsque l'opérateur tire sur la poignée de déblocage de secours manuelle	
Plan de couchage	Toutes les attaches sont correctement fixées	
	Fonctionnement correct du vérin du relève-buste	
	Au besoin, régler le vérin pneumatique pour une plage de mouvement maximale	
Base	Toutes les attaches sont correctement fixées	
Cadre en X	Le cadre en X se déplie et se rétracte	
Section tête	Toutes les attaches sont correctement fixées	
	La section tête se déploie et se verrouille	

Tous les six mois ou toutes les 12 heures d'utilisation

Inspecter ces éléments tous les six mois ou toutes les 12 heures de fonctionnement du moteur, selon la première éventualité.

Élément	Inspecter	
Système hydraulique	Usure ou détérioration des tuyaux et des raccords	
	Fusible de vélocité hydraulique - placer un poids d'environ 50 livres (23 kg) sur la civière, élever la civière, deux opérateurs soulèvent la civière, tirer la poignée de déblocage manuel de secours, abaisser rapidement la civière et vérifier qu'elle ne s'affaisse pas	
Commandes électroniques	Déployer la civière en position élevée, mesurer et vérifier la hauteur de charge	
	Le système qui permet de monter ou descendre par à-coups fonctionne	
	La rétractation rapide fonctionne	
Interrupteurs	Absence d'endommagement ou d'usure des deux interrupteurs	
	Les deux interrupteurs fonctionnent	
Plan de couchage	Aucun composant tordu, cassé ou endommagé	
	Absence d'endommagement ou de déchirures au niveau des poignées de la civière	
Base	Aucun composant tordu, cassé ou endommagé	

FR 7 6516-009-007 Rev AB.0

Élément	Inspecter
	Le montant de retenue de la civière est solidement installé. Si ce n'est pas le cas, remplacer la vis
	Absence de dommages excessifs au niveau des dispositifs de protection du cadre en X
Roues	Absence de débris
Section tête	Aucun composant tordu, cassé ou endommagé
	La poignée fonctionnelle n'est pas excessivement endommagée ou déchirée
	Fixation et roulement corrects des roues porteuses

Tous les 12 mois ou toutes les 24 heures d'utilisation

Inspecter ces éléments tous les 12 mois ou toutes les 24 heures de fonctionnement du moteur, à la première échéance.

Élément	Inspecter	
Paramètres	La civière et la fixation sont en bon état et fonctionnent	
	La barre de sécurité se connecte au crochet de sécurité du véhicule	
Vérin	Réglage du vérin - le contre-écrou est serré et la civière s'arrête lorsqu'elle atteint les butées fixes	
Poignée de déblocage de secours manuelle	Revient à la position repliée	
Plan de couchage	Toutes les soudures sont intactes, exemptes de fissures ou de cassures	
	Les étiquettes d'avertissement sont présentes et lisibles	
Base	Toutes les soudures sont intactes, exemptes de fissures ou de cassures	
Roues	Vérifier et régler le système de blocage des roues	

6516-009-007 Rev AB.0 8 FR

Fiche d'entretien

Date	Opération d'entretien exécutée	Par	Heures

FR 9 6516-009-007 Rev AB.0

Documentation sur la formation


	Date de la formation		
Nom du stagiaire	Formation de base	Programme de mise à jour	Manuel d'utilisation, en service, cours formel, etc.

6516-009-007 Rev AB.0 10 FR

Dépannage

Localisateur des systèmes électronique et hydraulique

Remarque - Certains composants ont été retirés pour plus de clarté.

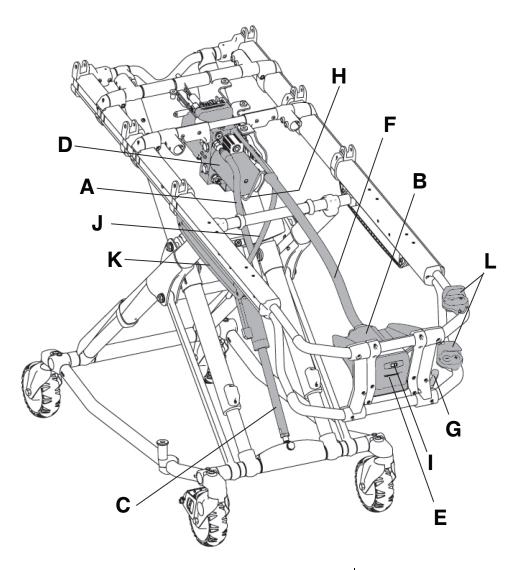


Α	Tuyau hydraulique côté capuchon
В	Boîtier électronique (carte de commande à l'intérieur)
С	Vérin hydraulique
D	Ensemble collecteur hydraulique
Е	Écran LCD
F	Câble principal

G	Poignée de déblocage de secours manuelle
Н	Câble de déblocage manuel
I	Voyant d'alimentation
J	Tuyau hydraulique côté tige
K	Boîtier du capteur (capteur d'effets Hall à l'intérieur)
L	Interrupteurs, réglage de la hauteur

FR 11 6516-009-007 Rev AB.0

Ensemble hydraulique

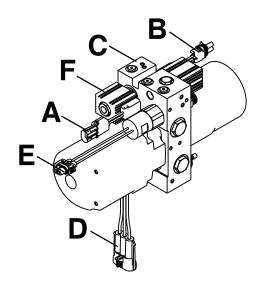

Α	Connecteur de la vanne A
В	Connecteur de la vanne B
С	Collecteur hydraulique

D	Connecteur de moteur
E	Manette de pression
F	Connecteur de la manette de pression

Schémas de câblage de l'ensemble hydraulique









С	В	A
	<u>a</u>	
_		

8

1	Manette de pression
2	Connecteur de la manette de pression
3	Électrovanne A
4	Connecteur de la vanne A
5	Électrovanne B
6	Connecteur de la vanne B

7	Moteur
8	Connecteur de moteur
9	Bleu
10	Noir
11	Vert

6516-009-007 Rev AB.0 12 FR

Schéma fonctionnel du système électrique - déchargement

Fonctions de levage et de déploiement


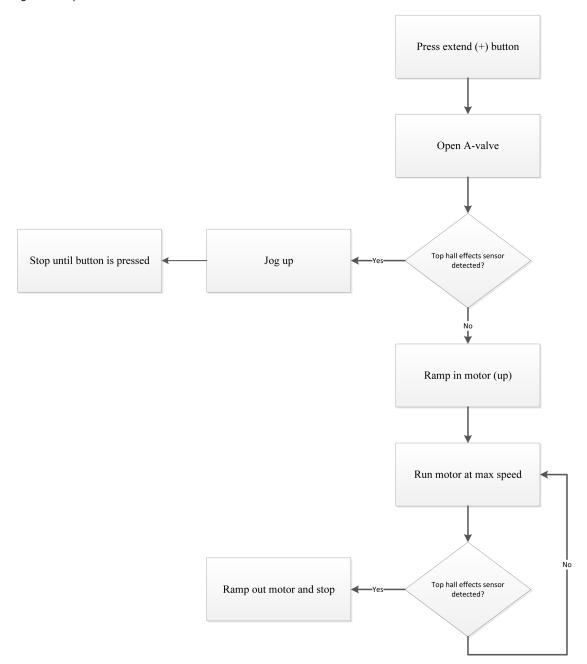


Schéma fonctionnel du système électrique - chargement

Fonctions d'abaissement et de rétraction

FR 13 6516-009-007 Rev AB.0

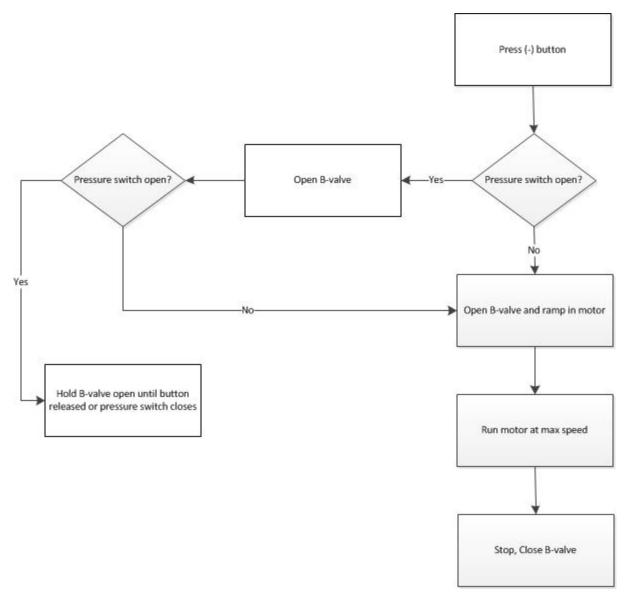

Le voyant d'alimentation du chargeur SMRT n'est pas allumé

S'assurer que l'alimentation secteur ou le câble CC sont branchés.

- 1. Avec une alimentation secteur, s'assurer que :
 - a. Le cordon d'alimentation secteur est branché dans une prise murale et la prise murale est alimentée en courant alternatif.
 - b. Le cordon d'alimentation secteur est branché dans le bloc d'alimentation.
 - c. Le cordon de sortie de l'alimentation secteur est branché sur le chargeur.
- 2. Avec un câble CC, s'assurer que :
 - a. Le câble CC est branché sur une source d'alimentation de 12,5 à 16 V CC.

Remarque - Le voyant de l'adaptateur du cordon de sortie de l'alimentation CC doit être allumé.

- b. Le fusible interne de l'adaptateur du cordon d'alimentation fonctionne. Si ce n'est pas le cas, remplacer le fusible. Voir Remplacement des fusibles du câble automobile 12 V CC (page 31).
- c. Le câble CC est branché sur le chargeur.
- 3. Vérifier la présence d'une tension de 12,5 à 16 V CC au niveau du cordon de sortie de l'alimentation électrique qui se branche dans le chargeur.
 - a. En l'absence de tension comprise entre 12,5 et 16 V CC, remplacer le bloc d'alimentation.
 - b. En présence d'une tension comprise entre 12,5 et 16 V CC, remplacer le chargeur.

Le chargeur SMRT ne charge pas le SMRT Pak

1. S'assurer que le voyant d'alimentation du chargeur est allumé.

6516-009-007 Rev AB.0 14 FR

- a. Si ce n'est pas le cas, voir Les voyants du chargeur SMRT ne sont pas allumés lorsque le Pak est inséré (page 15).
- 2. S'assurer que les voyants du chargeur clignotent lors de la première mise sous tension du chargeur.
 - a. Si les voyants clignotent au démarrage, passer à l'étape 3.
 - b. Si les voyants ne clignotent pas au démarrage, remplacer le chargeur.
- 3. Réinsérer le SMRT Pak sur le chargeur et vérifier l'état du SMRT Pak à l'aide les voyants du chargeur :
 - a. Orange fixe = erreur du **SMRT** Pak. Voir *Un SMRT Pak complètement chargé ne fournit pas une puissance suffisante pour le fonctionnement de la civière* (page 15).
 - b. Orange clignotant = délai de température. Laisser au SMRT Pak le temps d'atteindre la température de fonctionnement normale. Réinstaller le SMRT Pak et vérifier à nouveau l'étape 3.
 - c. Vert fixe = SMRT Pak complètement chargé et prêt. Voir Un SMRT Pak complètement chargé ne fournit pas une puissance suffisante pour le fonctionnement de la civière (page 15).

Les voyants du chargeur SMRT ne sont pas allumés lorsque le Pak est inséré

- 1. Débrancher le chargeur, attendre cinq secondes, puis rebrancher le chargeur dans la prise murale.
- S'assurer que le voyant d'alimentation du chargeur est allumé. Si ce n'est pas le cas, voir Le voyant d'alimentation du chargeur SMRT n'est pas allumé (page 14).
- S'assurer que le SMRT Pak est totalement inséré dans le chargeur. Si ce n'est pas le cas, réinsérer complètement le SMRT Pak, attendre un clic sonore et s'assurer que les voyants du chargeur s'allument.
- 4. Essayer un autre SMRT Pak pour identifier tout problème.

Remarque - Sécircuit imprimér et étiqueter les SMRT Paks pendant le dépannage.

- a. Si les voyants du chargeur ne s'allument pas, remplacer le chargeur.
- b. Si les voyants du chargeur s'allument, remplacer le SMRT Pak d'origine.

Un SMRT Pak complètement chargé ne fournit pas une puissance suffisante pour le fonctionnement de la civière

- 1. Charger complètement le SMRT Pak pendant deux heures.
- a. Si le voyant du chargeur est vert fixe, indiquant qu'un SMRT Pak est complètement chargé et prêt, passer à l'étape 2.
 - b. Si le voyant du chargeur est orange fixe, indiquant une erreur liée au SMRT Pak, remplacer le SMRT Pak.
- 2. Immédiatement après une charge complète, retirer le SMRT Pak du chargeur et vérifier que la tension au niveau des bornes d'alimentation du Pak est de 26 V CC minimum.
 - a. Si le Pak a un minimum de 26 V CC, passer à l'étape 3.
 - b. Si la tension est inférieur à 26 V CC, remplacer le Pak.
- 3. Attendre exactement une heure et recharger le SMRT Pak.
 - a. Si le voyant du chargeur devient vert fixe (ce qui indique qu'un **SMRT** Pak est complètement chargé et prêt) en moins d'une minute, appeler le service technique Stryker.
 - b. Si le voyant du chargeur clignote en vert pendant plus d'une minute, remplacer le Pak.

Le chargeur indique un délai de température (voyant orange clignotant), mais le Pak se trouve dans la plage de température de fonctionnement normale

- 1. Retirer le SMRT Pak du chargeur et le laisser le Pak refroidir pendant au moins quatre heures à température ambiante.
- 2. Insérer le Pak dans le chargeur.
 - a. Si le voyant du chargeur clignote en vert, le Pak est en cours de charge.
 - b. Si le voyant du chargeur clignote en orange, indiquant un retard de température, remplacer le Pak.

Le chargeur SMRT indique une erreur du SMRT Pak (voyant orange), mais le Pak fonctionne bien sur la civière

- 1. Décharger complètement le SMRT Pak en alimentant une civière jusqu'à ce que le voyant de la civière clignote en rouge.
- 2. Recharger le Pak.
 - a. Si le voyant du chargeur est vert fixe, indiquant qu'un Pak est complètement chargé et prêt, le Pak est prêt à être utilisé.
 - b. Si le voyant du chargeur est orange fixe, indiquant une erreur du Pak, appeler le support technique Stryker.

Dérive du plan de couchage (sans le poids du patient)

Vérifier le bon fonctionnement après chaque étape. Une fois le problème est résolu, remettre la civière en service. Si une assistance est nécessaire à tout moment pendant le dépannage, contacter un technicien d'entretien Stryker au (800) 327-0770.

1. Rincer le système hydraulique en appuyant sur la poignée de déblocage manuel tout en appuyant simultanément sur le bouton d'alimentation (+) pendant environ 15 secondes. Répéter si nécessaire.

FR 15 6516-009-007 Rev AB.0

- 2. Vérifier le réglage du câble de déblocage manuel.
- 3. Changer la vanne manuelle de verrouillage.
- 4. Changer la vanne « B ».

Dérive du châssis (sans le poids du patient)

- 1. Rincer le système hydraulique en appuyant sur la poignée de déblocage manuel tout en appuyant simultanément sur le bouton d'alimentation (+) pendant environ 15 secondes. Répéter si nécessaire.
- 2. Vérifier le réglage du câble de déblocage manuel.
- 3. Changer la vanne manuelle non verrouillable.
- 4. Changer la vanne « A ».

Le plan de couchage ne s'abaisse pas en mode motorisé

- 1. Vérifier le voyant d'alimentation.
 - a. Si le voyant clignote en orange, remplacer la batterie.
- 2. Vérifier l'absence d'erreur sur l'écran LCD.
- 3. Vérifier que les fils ne sont pas cassés ou déconnectés.
- 4. Vérifier la présence d'une tension de 24 V CC au niveau du connecteur (C), sur le câble principal, administrée par le moteur, en appuyant sur le bouton de rétraction (-). Si une tension est présente, remplacer (dans l'ordre) le capteur d'effets Hall, l'électrovanne et/ou la vanne « B ». En l'absence de tension, passer à l'étape 5.
- 5. Vérifier la présence d'une tension de 24 V CC sur les broches de l'ensemble électronique 1 bleue et 5 orange sur (F) en appuyant sur le bouton de rétraction (-). En l'absence de tension, remplacer l'ensemble électronique. Si la tension est présente, remplacer le faisceau de câblage.
 - a. Si le voyant vert s'allume mais ne s'abaisse pas, essayer l'autre interrupteur. Si l'autre interrupteur fonctionne, remplacez l'interrupteur défectueux.

Le plan de couchage ne se déploie pas en mode motorisé

- 1. Vérifier le voyant d'alimentation.
 - a. Si le voyant clignote en orange, remplacer la batterie.
- 2. Vérifier l'absence d'erreur sur l'écran LCD.
- 3. Vérifier que les fils ne sont pas cassés ou déconnectés.
- 4. Vérifier la présence d'une tension de 24 V CC au niveau du connecteur (C), sur le câble principal, administrée par le moteur, en appuyant sur le bouton de rétraction (-). Si une tension est présente, remplacer (dans l'ordre) le capteur d'effets Hall, l'électrovanne et/ou la vanne « B ». En l'absence de tension, passer à l'étape 5.
- 5. Vérifier la présence d'une tension de 24 V CC sur les broches de l'ensemble électronique 1 bleue et 5 orange sur (F) en appuyant sur le bouton de rétraction (-). En l'absence de tension, remplacer l'ensemble électronique. Si la tension est présente, remplacer le faisceau de câblage.
 - a. Si le voyant vert s'allume mais ne s'abaisse pas, essayer l'autre interrupteur. Si l'autre interrupteur fonctionne, remplacez l'interrupteur défectueux.
- 6. Vérifier le moteur.
 - a. Si le moteur fonctionne, mais n'élève pas la civière :
 - · Vérifier que le câble de déblocage manuel ne présente pas de tension excessive.
 - Tapoter légèrement la vanne de verrouillage manuel.
 - · Remplacer la vanne à verrouillage manuel.
 - b. Si le moteur est bloqué, remplacer la vanne « A ».
 - c. Si le voyant est vert, mais que le moteur ne fonctionne pas :
 - Vérifier la présence d'une tension de 24 V CC au niveau du connecteur (E), sur le câble principal. Si une tension est présente, remplacer le capteur d'effets Hall.
 - Si le capteur d'effets Hall est remplacé et que le moteur ne fonctionne toujours pas, remplacer le sous-ensemble hydraulique.
 - En l'absence de tension, passer à l'étape suivante.
 - Vérifier la présence d'une tension de 24 V CC sur la connexion de l'ensemble électronique (H), (-) sur le fil noir et (+) sur le fil vert, en appuyant sur le bouton d'extension (+). En l'absence de tension, remplacer l'ensemble électronique. Si une tension est présente, remplacer le câble principal.

Le châssis ne se rétracte pas en mode motorisé

- 1. Vérifier le voyant d'alimentation.
 - a. Si le voyant clignote en orange, remplacer la batterie.
- 2. Vérifier l'absence d'erreur sur l'écran LCD.
- 3. Vérifier que les fils ne sont pas cassés ou déconnectés.

6516-009-007 Rev AB.0 16 FR

- 4. Vérifier la présence d'une tension de 24 V CC au niveau du connecteur (C), sur le câble principal, administrée par le moteur, en appuyant sur le bouton de rétraction (-). Si une tension est présente, remplacer (dans l'ordre) le capteur d'effets Hall, l'électrovanne et/ou la vanne « B ». En l'absence de tension, passer à l'étape 5.
- 5. Vérifier la présence d'une tension de 24 V CC sur les broches de l'ensemble électronique 1 bleue et 5 orange sur (F) en appuyant sur le bouton de rétraction (-). En l'absence de tension, remplacer l'ensemble électronique. Si la tension est présente, remplacer le faisceau de câblage.

Le châssis ne se déploie pas en mode manuel

- 1. Vérifier le réglage manuel du câble.
- 2. Changer la vanne manuelle non verrouillable.

Le châssis ne se rétracte pas en mode manuel

- 1. Vérifier le réglage du câble de déblocage manuel.
- 2. Changer la vanne manuelle de verrouillage.

Le plan de couchage ne se rétracte pas en mode manuel (avec le poids du patient)

- 1. S'assurer que le poids ne repose pas sur les roulettes avant d'abaisser la civière.
- 2. Vérifier le réglage manuel du câble.
- 3. Remplacer la vanne manuelle de verrouillage.

Le plan de couchage ne se déploie pas en mode manuel

- 1. Vérifier le réglage manuel du câble.
- 2. Changer la vanne manuelle non verrouillable.

La rétraction rapide ne s'enclenche pas

- 1. Vérifier que le poids ne repose pas sur les roulettes.
- 2. Changer le commutateur de pression.
- 3. Changer le câble à effet Hall.

Codes d'erreur de l'écran LCD - micro principal

Écran LCD	Description de l'erreur	Période de détection
ERR 01	Échec du diagnostic de la RAM	Initialisation
ERR 02	Échec de la mémoire du programme	Initialisation
ERR 03	Échec du diagnostic EE	Initialisation
ERR 04	Type EEPROM et type de matériel incompatibles	Initialisation
ERR 10	Échec du diagnostic des vannes	Initialisation
ERR 61	Rév. EEPROM et rév. micrologicielle incompatibles	Initialisation
ERR 21	Moteur court-circuité	Initialisation
ERR 22	Moteur ouvert	Initialisation
ERR 23	Relais de portillonage haute puissance court- circuité	Initialisation
ERR 51	FET de l'entraînement du moteur court-circuité - Q15	Initialisation
ERR 52	FET de l'entraînement du moteur court-circuité - Q11	Initialisation
ERR 55	FET de l'entraînement du moteur court-circuité - Q16	Initialisation
ERR 56	FET de l'entraînement du moteur court-circuité - Q12	Initialisation
ERR 62	Incompatibilité de limite de courant entre le micro principal et l'ASIC	Initialisation
ERR 80	Bouton de déploiement (+) ou de rétraction (-) détecté sans touche	Durée d'exécution
ERR 31	Surchauffe de la carte du circuit électronique (280,22 °F ± 5 %)	Durée d'exécution

FR 17 6516-009-007 Rev AB.0


Écran LCD	Description de l'erreur	Période de détection
ERR 81	Mauvaise combinaison de capteurs à effet Hall	Durée d'exécution
ERR 93	Micro de sécurité non réactif	Durée d'exécution

Micro de sécurité


Écran LCD	Description de l'erreur	Période de détection
ERR 05	Échec du diagnostic de la RAM	Initialisation
ERR 06	Échec du diagnostic de la mémoire du programme	Initialisation
ERR 08	Type EEPROM et type de matériel incompatibles	Initialisation
ERR 40	Erreur de données	Durée d'exécution
ERR 41	Échec de charge de la batterie	Durée d'exécution
ERR 42	Échec de charge, lecture de la batterie	Durée d'exécution
ERR 43	Échec de charge, temps de charge de la batterie ou dépassement de la limite de tension	Durée d'exécution
ERR 44	Échec de charge, courant de charge	Durée d'exécution
ERR 45	Échec de charge, température delta	Durée d'exécution
ERR 63	Rév. EEPROM et rév. micrologicielle incompatibles	Initialisation
ERR 83	Bouton de déploiement (+) ou de rétraction (-) détecté sans touche	Durée d'exécution
ERR 90	Pilotage de l'ASIC sans instructions du microprocesseur	Durée d'exécution

6516-009-007 Rev AB.0 18 FR

Câble avec connecteur principal

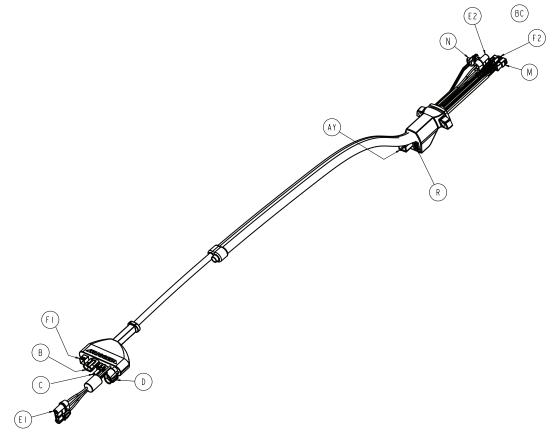


Schémas de câblage du câble principal

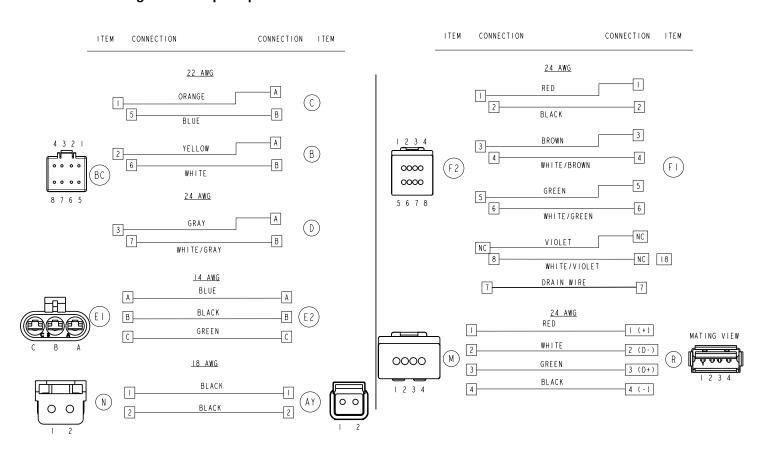


FR 19 6516-009-007 Rev AB.0

Carte de commande

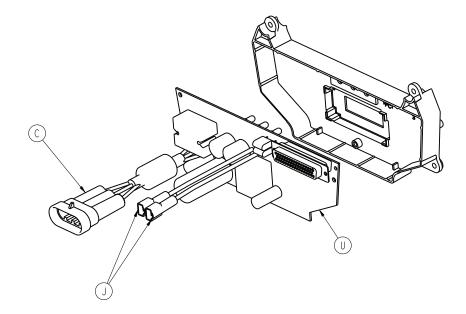

6516-009-007 Rev AB.0 20 FR

Schémas de câblage de la carte de commande

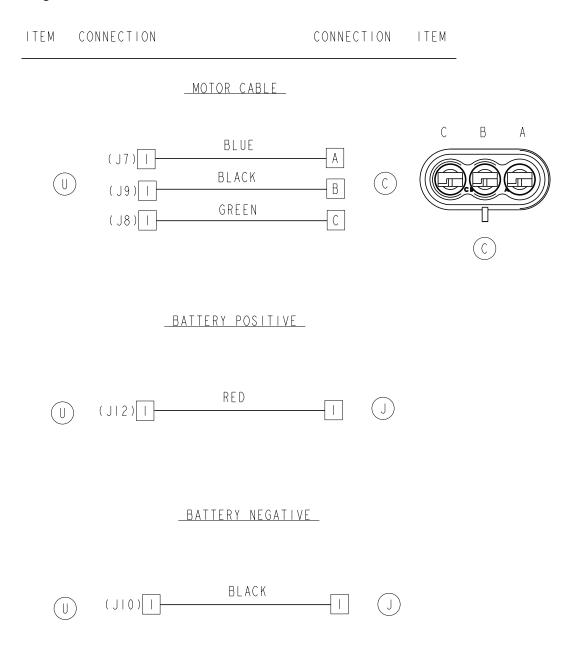

FR 21 6516-009-007 Rev AB.0

Entretien

Remplacement de la section tête

Outils requis:

- · Clé mixte de 7/16 po
- Clé à 6 pans de 3/16 po

Procédure :

- 1. Élever le produit à la position de hauteur maximale.
- 2. À l'aide d'une clé mixte de 7/16 po et d'une clé à 6 pans de 3/16 po, retirer les deux vis (A) qui fixent les roulements à chapeau au support d'interface du plan de couchage du châssis (une de chaque côté) (Figure 3). Conserver les vis.

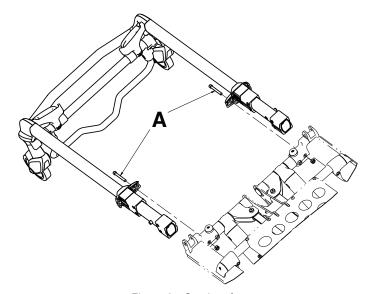


Figure 3 - Section tête

- 3. Serrer les poignées de déblocage de la tête et retirer l'ensemble section tête.
- 4. Inverser la procédure pour réinstaller.
- 5. S'assurer du fonctionnement correct du produit avant de le remettre en service.

Réglage manuel du câble de déblocage

Outils requis:

- Clé mixte de 8 mm
- Clé mixte de 10 mm
- (2) Poids (50 livres chacun)

Procédure :

- 1. Soutenir le plan de couchage de manière à ce qu'aucun poids ne repose sur le châssis.
- 2. S'assurer que le câble de déblocage manuel est intact (A) (Figure 4).
- 3. À l'aide d'une clé mixte de 10 mm, desserrer l'écrou de blocage du câble (B) (Figure 4).
- 4. À l'aide d'une clé mixte de 8 mm, ajuster la tension sur le câble de déblocage manuel de sorte qu'il commence juste à toucher la double attache de déblocage manuel (C) (Figure 4).

Remarque - S'assurer que la double attache de déblocage manuel n'est pas serrée contre les écrous de la vanne manuelle.

- 5. Serrer l'écrou de blocage du câble.
- 6. Appliquer un poids de 22 kg sur le revêtement hydraulique.
- 7. La hauteur de charge doit indiquer 34 1/2 po à 35 1/2 po.
- 8. Placer un poids de 45 kg sur le revêtement hydraulique, élever la civière à la hauteur maximale, tirer sur la poignée de déblocage manuel et s'assurer que la civière ne descend pas.
- 9. Retirer le poids de 45 kg, élever la civière à sa hauteur maximale, tirer sur la poignée de déblocage manuel et s'assurer que la civière descend.

6516-009-007 Rev AB.0 22 FR

10. S'assurer du fonctionnement correct du produit avant de le remettre en service.

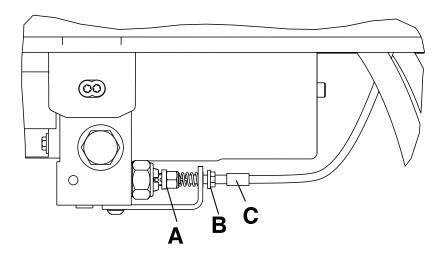


Figure 4 - Câble de déblocage manuel

Remplissage du réservoir de l'ensemble hydraulique

Utiliser uniquement l'huile synthétique mélangée Mobil Mercon® V (6500-001-293) pour remplir le réservoir de l'ensemble hydraulique.

Remarque - De l'huile peut être perdue à chaque fois que le système hydraulique est utilisé.

Outils requis:

• Clé à 6 pans de 3/16 po

Procédure :

- 1. Élever le produit à la position de hauteur maximale.
- 2. S'assurer que l'orifice de remplissage est horizontal et aligné avec l'orifice du support du moteur.
- 3. À l'aide d'une clé à 6 pans de 3/16 po, retirer l'obturateur du port (A) (Figure 5). Conserver l'obturateur du port.
- 4. Remplir le réservoir jusqu'au fond de l'orifice de remplissage.
- 5. À l'aide d'une clé à 6 pans de 3/16 po, remettre l'obturateur en place puis élever et abaisser la civière plusieurs fois.
- 6. S'assurer du fonctionnement correct du produit avant de le remettre en service.

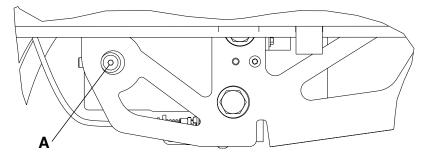


Figure 5 - Réservoir de l'ensemble hydraulique

Réglage de la force de verrouillage des roues

Outils requis:

- Clé hexagonale de 5/32 po
- Clé mixte ou douille de 7/16 po

FR 23 6516-009-007 Rev AB.0

Procédure :

- À l'aide d'une clé hexagonale de 5/32 po et d'une clé mixte de 7/16 po ou d'une douille, retirer la vis à tube du centre de la pédale de verrouillage.
 Conserver la vis. Le blocage de roue est initialement assemblé avec la pédale réglée sur la force de verrouillage minimale. Le repère sur la pédale (A) est aligné avec le repère sur la gaine octogonale (B) (Figure 6).
- 2. Retirer la gaine octogonale (B). Tourner la gaine octogonale dans le sens antihoraire pour augmenter la force de verrouillage de la pédale et dans le sens horaire pour la diminuer. Insérer la gaine octogonale dans la pédale.
- 3. À l'aide d'une clé hexagonale de 5/32 po et d'une clé mixte ou d'une douille de 7/16 po, réinstaller la vis à douille (retirée à l'étape 1).
- 4. Tester la force de verrouillage de la pédale et s'assurer que la pédale est maintenue avant de remettre le produit en service.

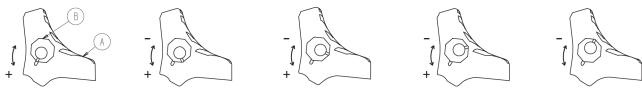


Figure 6 - Réglage de la force de verrouillage des roues

Réglage du mécanisme Steer-Lock

Outils requis:

Clé mixte de 9/16 po

Procédure:

- 1. Si le mécanisme Steer-Lock ne s'enclenche pas :
 - a. À l'aide d'une clé mixte de 9/16 po, ajuster les écrous cylindriques vers le côté pieds de la civière (Figure 7).
 - b. Après le réglage, s'assurer qu'au moins un filetage complet est exposé de chaque côté de l'écrou cylindrique.
- 2. Si le mécanisme Steer-Lock ne se désengage pas :
 - a. À l'aide d'une clé mixte de 9/16 po, ajuster les écrous cylindriques vers le côté tête de la civière (Figure 8).
 - b. Après le réglage, s'assurer qu'au moins un filetage complet est exposé de chaque côté de l'écrou cylindrique.



Figure 7 – Écrou cylindrique du côté pieds



Figure 8 – Écrou cylindrique du côté tête

Réglage du montant de retenue de la civière

MISE EN GARDE - Le montant de retenue de la civière est livré préconfiguré pour une civière à cadre en X. Si la fixation a été configurée pour une civière à cadre en H, ajuster le montant de retenue pour l'adapter à la fixation.

Remarque

- Pour déterminer si la civière est une civière à cadre en X ou en H, rechercher une flèche ou une rainure sur le support inférieur du montant de retenue de la civière.
- Le montant de retenue de la civière est réglé pour une civière à cadre en X si la flèche du support inférieur du montant de retenue pointe vers le côté tête de la civière ou si la rainure du support inférieur est située à l'intérieur du côté gauche du patient du tube de base.
- Le montant de retenue de la civière est réglé pour une civière à cadre en H si la flèche du support inférieur du montant de retenue pointe vers le côté pieds de la civière ou si la rainure du support inférieur est située à l'extérieur du côté gauche du patient du tube de base.

6516-009-007 Rev AB.0 24 FR

Outils requis:

· Clé Torx T30

Procédure :

À l'aide d'une clé Torx T30, retirer les deux vis d'assemblage à six pans creux (A) qui fixent les supports (B) au châssis du châssis (C) (Figure 9).

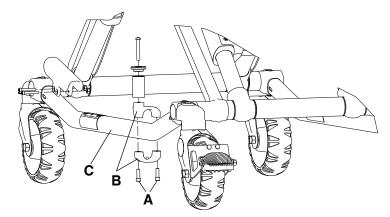


Figure 9 - Montant de retenue de la civière

- 2. Tourner le support inférieur de 180 degrés.
- 3. À l'aide d'une clé Torx T30, réinstaller les deux vis d'assemblage à six pans creux (retirées à l'étape 1).
- 4. S'assurer du fonctionnement correct du produit avant de le remettre en service.

Remplacement du montant de retenue de la civière

Remarque - Un réglage de l'ensemble clamp de rail peut s'avérer nécessaire pour compenser toute variation de la position du montant de retenue de la civière, en fonction du fabricant et du numéro de modèle de la civière d'ambulance.

Outils requis:

- Clé Torx T30
- Clé hexagonale de 5/32 po
- · Clé dynamométrique (po-lb)

Procédure :

- 1. Élever le produit à la position de hauteur maximale.
- 2. Tourner la civière du côté gauche du patient.

Remarque - Localiser la flèche ou la rainure sur le support inférieur. Le support du montant de retenue de rechange doit être monté dans le même sens

- À l'aide d'une clé Torx T30, retirer les deux vis d'assemblage à six pans creux (A) qui fixent le montant de retenue de la civière au tube du châssis (B) (Figure 10). Mettre de côté les vis et le montant de retenue de la civière.
- 4. Insérer la vis d'assemblage à tête ronde (C) dans le capuchon du montant de retenue (D) et le tube du montant (E), puis dans le support pour broche supérieur (F) (Figure 10).
- 5. À l'aide d'une clé à 6 pans de 5/32 po, serrer la vis d'assemblage à tête ronde (C) pour fixer le capuchon du montant de retenue (D) et le tube du montant (E) au support de broche supérieur (F) (Figure 10). À l'aide d'une clé dynamométrique, serrer la vis à un couple 100-140 po-lb.
- 6. Monter le montant de retenue de la civière sur le tube du châssis. Aligner les trous des supports et insérer deux vis d'assemblage à six pans creux (A) dans les trous filetés du support pour broche du bas (G) (Figure 10).
- 7. À l'aide d'une clé Torx T30, serrer les deux vis d'assemblage à six pans creux.
- 8. S'assurer du fonctionnement correct du produit avant de le remettre en service.

FR 25 6516-009-007 Rev AB.0

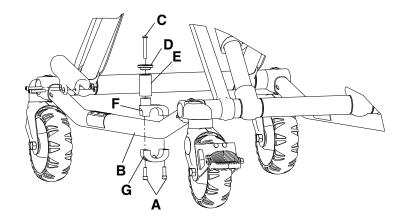


Figure 10 - Remplacement du montant de retenue de la civière

Remplacement des vis du montant de retenue de la civière

Outils requis:

- · Clé Torx T25
- Clé à 6 pans de 5/32 po
- · Clé dynamométrique (po-lb)

Procédure :

- 1. À l'aide d'une clé Torx T25 ou d'une clé à 6 pans de 5/32 po, retirer la vis d'assemblage à tête ronde qui fixe le capuchon du montant de retenue et le tube du montant au support de broche supérieur. Mettre la vis de côté.
- 2. À l'aide d'une clé à 6 pans de 5/32 po, installer et serrer la vis d'assemblage à tête ronde (0004-503-000) pour fixer le capuchon et le tube du montant de retenue sur la partie supérieure de l'ensemble montant de retenue. À l'aide d'une clé dynamométrique, serrer la vis à un couple 100-140 po-lb.

Remarque - S'il n'est pas possible de serrer la vis à un couple de 100-140 po-lb, remplacer l'intégralité du montant de retenue de la civière (voir Remplacement du montant de retenue de la civière (page 25)).

3. S'assurer du fonctionnement correct du produit avant de le remettre en service.

Remplacement de la valve hydraulique A ou B

Outils requis:

- Clé Torx T25
- Clé mixte de 3/4 po
- · Clé mixte de 7/8 po
- (2) Chevalet
- Serviettes

Procédure :

- 1. Élever le produit à la position de hauteur maximale.
- 2. Soutenir le plan de couchage à l'aide de deux chevalets. Activer la poignée de déblocage manuel pour relâcher toute pression d'huile hydraulique.
- 3. À l'aide d'une clé Torx T25, retirer le plateau du siège du plan de couchage pour accéder à l'ensemble hydraulique.
- 4. Déconnecter toutes les connexions à l'ensemble câble principal.
- 5. À l'aide d'une clé mixte de 3/4 po, retirer l'écrou qui fixe l'électrovanne à la vanne A (A) ou à la vanne B (B) (Figure 11). Conserver l'écrou.
- 6. Retirer l'électrovanne de la vanne. Conserver l'électrovanne.
- 7. À l'aide d'une clé mixte de 7/8 po, retirer la vanne A ou la vanne B du sous-ensemble hydraulique (Figure 11).

Remarque - L'huile hydraulique fuit de la vanne et du collecteur. Poser des serviettes pour absorber l'huile.

6516-009-007 Rev AB.0 26 FR

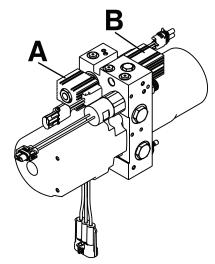


Figure 11 - Remplacement de la valve hydraulique A ou B

- 8. Inverser la procédure pour réinstaller.
- 9. Vérifier le fonctionnement en relevant et en abaissant plusieurs fois la civière. Si nécessaire, ajouter de l'huile hydraulique (voir Remplissage du réservoir de l'ensemble hydraulique (page 23)).
- 10. S'assurer du fonctionnement correct du produit avant de le remettre en service.

Remplacement de la valve de déblocage manuelle hydraulique

Outils requis:

- Clé Torx T27
- Clé mixte de 7/16 po
- Clé à 6 pans de 1/8 po
- · Clé à 6 pans de 7/8 po
- · (2) Chevalet

Procédure :

- 1. Élever le produit à la position de hauteur maximale.
- 2. Soutenir le plan de couchage à l'aide de deux chevalets. Activer la poignée de déblocage manuel pour relâcher toute pression d'huile hydraulique.
- 3. À l'aide d'une clé Torx T27, retirer les deux vis d'assemblage à tête ronde (A) qui fixent le support du câble de libération manuelle au bas du sousensemble hydraulique (Figure 12).
- 4. À l'aide d'une clé à 6 pans de 1/8 po, placer la clé à 6 pans dans la tige, au niveau de la rainure du corps de clapet, pour maintenir la tige de la vanne en position.
- 5. À l'aide d'une clé mixte de 7/16 po, retirer l'écrou hexagonal en Nylock (B) de chacune des tiges de vanne (Figure 12).
- 6. À l'aide d'une clé à 6 pans de 7/8 po, retirer la vanne (C ou D) à remplacer (Figure 12).

FR 27 6516-009-007 Rev AB.0

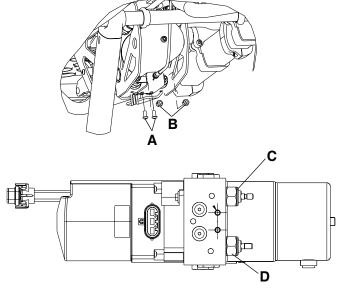


Figure 12 - Vanne de déblocage manuel hydraulique

- 7. Inverser la procédure pour réinstaller.
- 8. Vérifier le fonctionnement en relevant et en abaissant plusieurs fois la civière. Si nécessaire, ajouter de l'huile hydraulique (voir Remplissage du réservoir de l'ensemble hydraulique (page 23)).
- 9. S'assurer du fonctionnement correct du produit avant de le remettre en service.

Remplacement du vérin hydraulique

Outils requis:

- · Clé mixte de 9/16 po
- Clé mixte de 3/4 po
- Clé mixte de 11/16 po
- Clé mixte de 13/16 po
- · Clé mixte de 3/8 po
- · Clé à 6 pans de 1/8 po
- · (2) Chevalet
- Serviettes

Procédure :

- 1. Élever le produit à la position de hauteur maximale.
- 2. Soutenir le plan de couchage à l'aide de deux chevalets. Activer la poignée de déblocage manuel. Comprimer manuellement le piston pour circuit imprimé la tension sur le boulon de raccordement du tube transversal du châssis.
- 3. À l'aide de clés mixtes de 3/4 po et de 9/16 po, retirer la broche de fixation de la tige (A), la rondelle (B) et l'écrou hexagonal Nylock (C) qui fixent le vérin hydraulique au châssis (Figure 13). Conserver toutes les pièces.
- 4. Activer la poignée de déblocage manuel et comprimer complètement le vérin hydraulique.
- 5. À l'aide d'une clé mixte de 11/16 po et d'une clé mixte de 13/16 po, retirer les deux tuyaux (D) du vérin hydraulique (E) (Figure 13).

Remarque - L'huile hydraulique s'échappera des tuyaux et du cylindre. Poser des serviettes pour absorber l'huile.

- 6. Maintenir les extrémités du tuyau en position haute et verticale pour minimiser la quantité de liquide perdue.
- 7. À l'aide d'une clé à 6 pans de 1/8 po et d'une clé mixte de 3/8 po, retirer les deux vis de réglage à six pans creux (F) et les écrous hexagonaux Fiberlock (G) qui fixent le vérin hydraulique au châssis (Figure 13). Conserver les écrous et les vis.

6516-009-007 Rev AB.0 28 FR

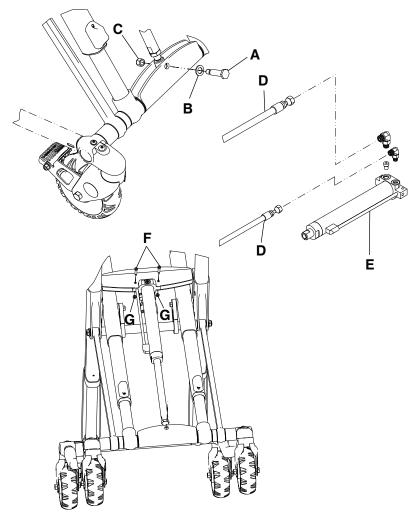


Figure 13 - Remplacement du vérin hydraulique

- 8. Inverser la procédure pour réinstaller.
- 9. Vérifier le fonctionnement en relevant et en abaissant plusieurs fois la civière. Si nécessaire, ajouter de l'huile hydraulique (voir Remplissage du réservoir de l'ensemble hydraulique (page 23)).
- 10. S'assurer du fonctionnement correct du produit avant de le remettre en service.

Remplacement du tuyau hydraulique

Outils requis:

- Clé mixte de 11/16 po
- Clé mixte de 13/16 po
- (2) Chevalet
- · Serviettes

Procédure :

- 1. Élever le produit à la position de hauteur maximale.
- 2. Soutenir le plan de couchage à l'aide de deux chevalets. Activer la poignée de déblocage manuel pour relâcher toute pression d'huile hydraulique. Remarque
 - Faire attention à l'acheminement du tuyau hydraulique pour la réinstallation.
 - L'huile hydraulique s'échappera des tuyaux et du cylindre. Poser des serviettes pour absorber l'huile.
- 3. À l'aide d'une clé mixte de 11/16 po et d'une clé mixte de 13/16 po, retirer le tuyau hydraulique (A ou B) (Figure 14). Mettre le tuyau de côté.

FR 29 6516-009-007 Rev AB.0

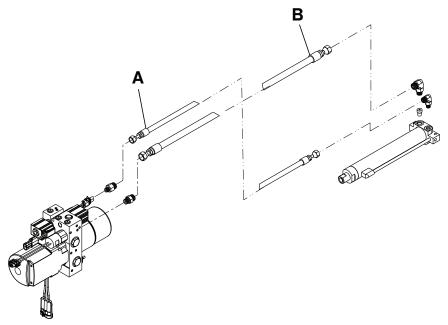


Figure 14 - Remplacement du tuyau hydraulique

- 4. Inverser la procédure pour réinstaller.
- 5. Vérifier le fonctionnement en relevant et en abaissant plusieurs fois la civière. Si nécessaire, ajouter de l'huile hydraulique (voir Remplissage du réservoir de l'ensemble hydraulique (page 23)).
- 6. S'assurer du fonctionnement correct du produit avant de le remettre en service.

Remplacement du bloc terminal

Outils requis:

- Clé Torx T20
- · Clé Torx T25

Procédure :

- 1. Élever le produit à la position de hauteur maximale.
- 2. Retirer et conserver la batterie.
- 3. À l'aide d'une clé Torx T25, retirer les six vis d'assemblage à tête ronde externes (A) de la façade (Figure 15). Conserver les vis.
- 4. À l'aide d'une clé Torx T20, retirer les quatre vis delta internes (B) de la façade pour la retirer (Figure 15). Conserver les vis et la façade.
- 5. À l'aide d'une clé Torx T20, retirer les quatre vis delta (C) qui fixent l'ensemble électronique à l'enceinte du côté pieds et retirer l'ensemble électronique (Figure 15). Conserver toutes les pièces.

6516-009-007 Rev AB.0 30 FR

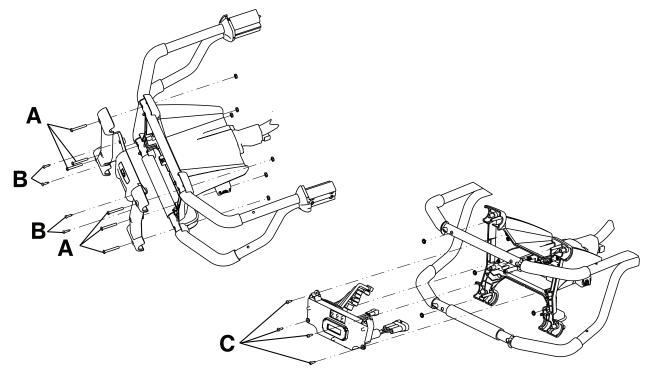


Figure 15 - Remplacement du bloc terminal

- 6. Débrancher les fils noir et rouge qui relient l'ensemble câble de connexion de la civière (D) au panneau de commande (E) (Figure 16).
- 7. À l'aide d'une clé Torx T20, retirer les deux vis delta (F) de la plaque inférieure de l'enceinte du côté pieds (G) pour retirer l'enceinte (Figure 16). Conserver toutes les pièces.

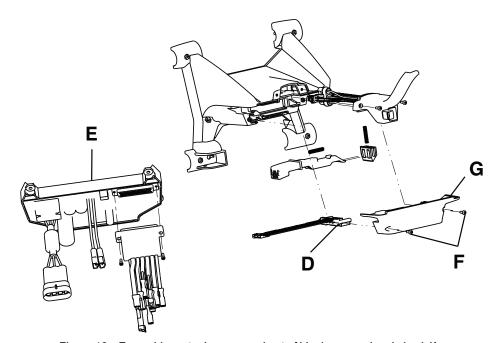


Figure 16 – Ensemble carte de commande et câble de connexion de la civière

- 8. Retirer la borne et le mettre de côté.
- 9. Inverser la procédure pour réinstaller.
- 10. Vérifier le fonctionnement en relevant et en abaissant plusieurs fois la civière.
- 11. S'assurer du fonctionnement correct du produit avant de le remettre en service.

Remplacement des fusibles du câble automobile 12 V CC

Outils requis:

Aucun

FR 31 6516-009-007 Rev AB.0

Procédure :

- 1. Débrancher le câble de l'adaptateur de la fiche (B) et du connecteur de la fiche (A) (Figure 17).
- 2. Dévisser l'extrémité du côté source et retirer le fusible.

Remarque - L'extrémité de la source et le ressort de tension du fusible sont desserrés et pourraient tomber.

- 3. Installer le fusible de 10 A et 250 V fourni dans l'extrémité source du câble de l'adaptateur et revisser l'extrémité.
- 4. Rebrancher les deux extrémités dans la source et le chargeur.
- 5. Tester le fonctionnement avant de remettre le chargeur en service.

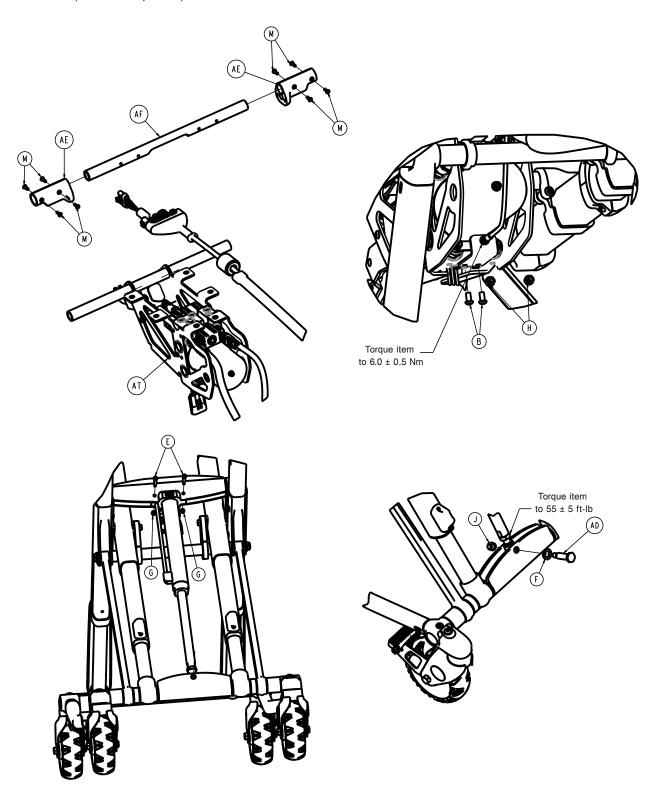


Figure 17 – Câble automobile de 12 V CC


6516-009-007 Rev AB.0 32 FR

Ensemble civière


6516-001-010 rév. AB (référence uniquement)




FR 33 6516-009-007 Rev AB.0

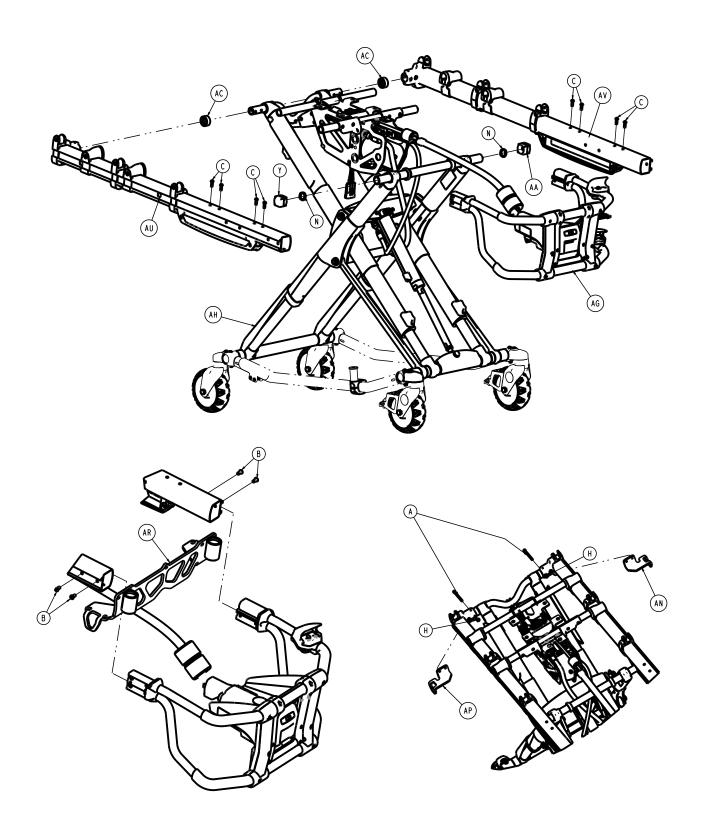

6516-009-007 Rev AB.0 34 FR

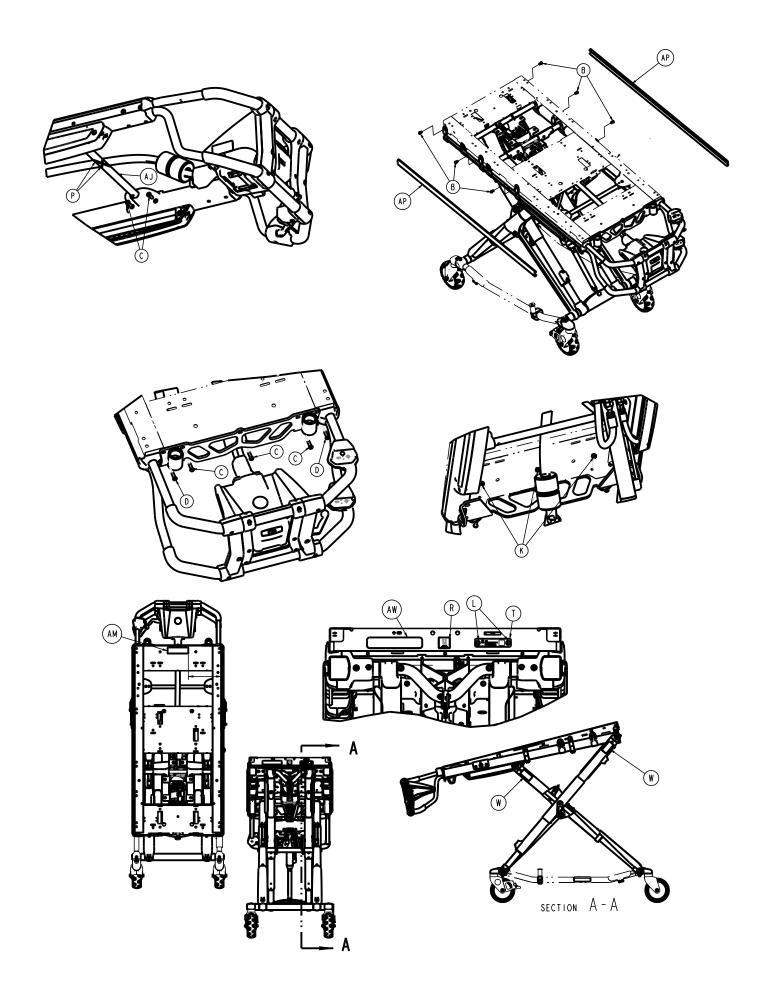

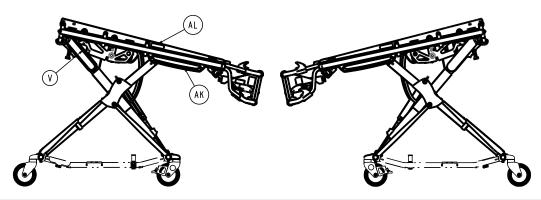

Élément	Numéro	Nom	Quantité
Α	0004-517-000	Vis d'assemblage à six pans creux	2
В	0004-589-000	Vis d'assemblage à tête ronde	12
С	0004-592-000	Vis d'assemblage à tête ronde	15
D	0004-593-000	Vis d'assemblage à tête ronde	2
E	0008-030-000	Vis à tête creuse	2
F	0011-013-000	Rondelle	1
G	0016-002-000	Écrou hexagonal Fiberlock	2
Н	0016-028-000	Écrou hexagonal Fiberlock	4
J	0016-035-000	Écrou hexagonal Nylock	1
K	0016-102-000	Écrou hexagonal Nylock	3
L	0025-079-000	Rivet de la tête du dôme	2
M	0025-133-000	Rivet de la tête du dôme	8
N	0038-574-000	Ressort crête à crête	2
P	0059-211-000	Attache-câble en nylon 28 cm	2
R	2030-009-901	Étiquette, DEEE	1
Т	6516-001-926	Étiquette 6516, numéro de série	1
V	6082-090-043	Étiquette, 28 cm	2
W	6252-101-139	Étiquette, ne pas lubrifier	4
Υ	6500-001-017	Glissière, aimant	1
AA	6500-001-123	Glissière, effets Hall	1
AB	6500-001-127	circuit imprimé-chocs de rail externe	2
AC	6500-001-128	Espaceur en plastique pour extrusion en plastique	2
AD	6500-001-168	Broche, fixation de tige	1
AE	6500-001-195	Moulure de montage du moteur	2
AF	6500-001-196	Traverse du plan de couchage	1
AG	6500-102-015	Ensemble côté pieds	1
AH	6506-001-012	Ensemble châssis	1
AJ	6510-001-013	Ensemble traverse	1
AK	6510-101-116	Étiquette, Power-PRO IT	2
AL	6510-101-117	Étiquette, capacité de poids	2
AM	6510-101-121	Étiquette, avertissement	1
AN	6510-001-126	Attache du support du côté tête, côté gauche du patient	1
AP	6510-001-127	Attache du support du côté tête, côté droit du patient	1
AR	6510-101-052	Soudure de la douille côté pieds	1


6516-009-007 Rev AB.0 36 FR

Élément	Numéro	Nom	Quantité
AT	6516-001-014	Centrale électrique, ensemble, montée	1
AU	6516-001-027	Sous-ensemble rail externe, côté droit du patient (page 54)	1
AV	6516-001-028	Sous-ensemble rail externe, côté gauche du patient (page 55)	1
AW	6516-101-100	Étiquette, caractéristiques techniques Power- PRO IT	1


FR 37 6516-009-007 Rev AB.0

Ensemble châssis

6506-001-012 rév. AA (référence uniquement)

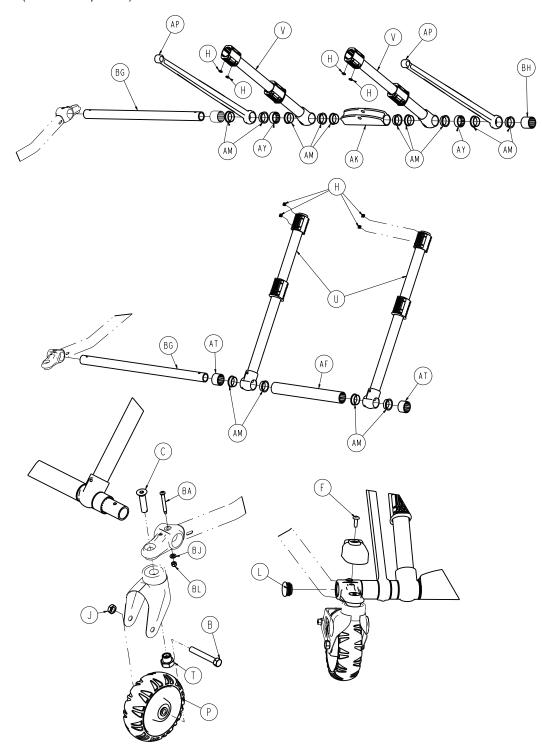


6516-009-007 Rev AB.0 38 FR

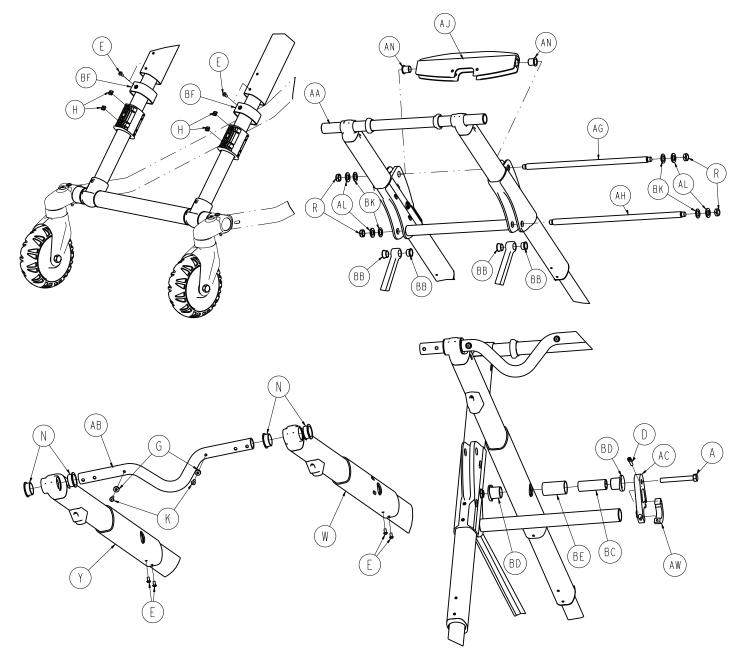

Remarque - L'élément AE (6500-001-309) n'est pas illustré pour plus de clarté (image miroir de l'élément AC (6500-001-308)).

FR 39 6516-009-007 Rev AB.0

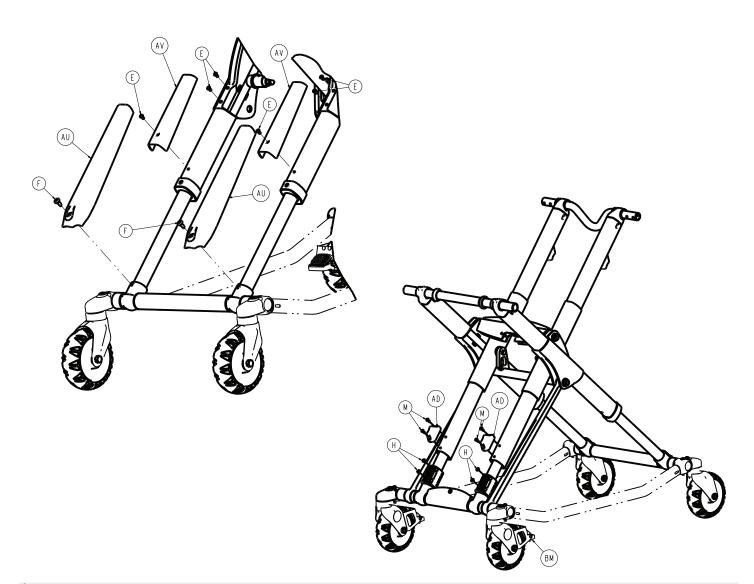

Élément	Numéro	Nom	Quantité
Α	0003-388-000	Vis d'assemblage à tête hexagonale	2
В	0003-205-000	Vis d'assemblage à tête hexagonale	4
С	0004-319-000	Boulon à six pans creux à tête plate/hex	4
D	0004-659-000	Vis d'assemblage à six pans creux	2
E	0004-587-000	Vis d'assemblage à tête ronde	12
F	0007-086-000	Vis à tête en treillis	6
G	0014-115-000	Rondelle	2
Н	0015-051-000	Écrou carré	16
J	0016-060-000	Contre-écrou hexagonal Toplock	4
K	0025-133-000	Rivet pop de la tête du dôme	2
L	0037-083-000	Bouchon de tube	4
M	0004-634-000	Vis d'assemblage à tête ronde	4
N	0081-244-000	Roulement de bride	4
Р	6060-002-010	Ensemble de roue moulée de 6 po (page 44)	4
R	0016-049-000	Écrou hexagonal Nylock	4
Т	6090-001-009	Écrou de roulette	4
U	6500-301-021	Ensemble tube de levage externe, pivot du châssis (page 50)	2


6516-009-007 Rev AB.0 40 FR

Élément	Numéro	Nom	Quantité
V	6500-301-022	Ensemble tube de levage interne, pivot du châssis	
		(page 51)	
W	6500-001-034	Tube de levage interne, pivot du plan de couchage, ensemble côté droit du patient (page 52)	1
Y	6500-001-035	Tube de levage interne, pivot du plan de couchage, ensemble côté gauche du patient (page 53)	1
AA	6500-001-056	Cadre du châssis du tube interne	1
AB	6500-001-090	Tube transversal du côté tête	1
AC	6500-001-308	Sangle de base, côté droit du patient	1
AD	6500-001-125	Butée fixe du châssis	2
AE	6500-001-309	Sangle du châssis, côté gauche du patient	1
AF	6500-001-129	Espaceur en plastique pour extrusion en plastique	1
AG	6500-001-171	Tube transversal de montage du cylindre	1
AH	6500-001-182	Tube transversal pour barre de renfort	1
AJ	6500-001-164	Pivot de montage du cylindre, supérieur	1
AK	6500-001-165	Pivot de montage du cylindre, inférieur	1
AL	6500-001-225	Rondelle en D	4
AM	6500-001-166	Roulement de bride	14
AN	6500-001-157	Roulement de bride	2
AP	6500-001-172	Lien d'assistance	2
AT	6500-001-178	Espaceur en plastique pour extrusion en plastique	2
AU	6500-001-179	Protection supérieure du cadre en X, inférieure	2
AV	6500-001-180	Protection supérieure du cadre en X, supérieure	2
AW	6500-001-310	Pince de sangle de base	2
AY	6500-001-183	Espaceur en plastique pour extrusion en plastique	2
ВА	6085-001-097	Boulon de montage de roulette	4
BB	6500-001-162	Roulement de bride	4
BC	6500-001-341	Pivot du tube du châssis	2
BD	6500-001-226	Roulement du pivot du tube du châssis	4
BE	6500-001-227	Pivot du tube du châssis	2
BF	6500-001-228	Manchon interne du tube de levage	2
BG	6500-001-229	Tube du châssis du pied	2
ВН	6500-001-230	Espaceur en plastique pour extrusion en plastique	1
BJ	0014-002-000	Rondelle	4
ВК	0014-040-000	Rondelle plate	4
BL	0016-002-000	Écrou Fiberlock	4
ВМ	6086-200-010	Ensemble verrouillage de roulette réglable (page 43)	2

FR 41 6516-009-007 Rev AB.0

Ensemble de corne de roulette

6082-002-012 rév. C (référence uniquement)

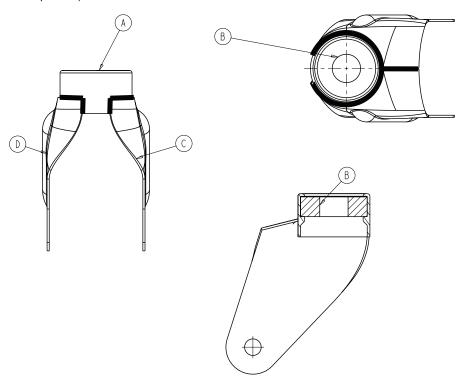


Élément	Numéro	Nom	Quantité
Α	6082-002-039	Garde de roulement	1
В	0081-227-000	Roulement	1
С	6082-002-042	Plaque de corne de roulette, côté gauche du patient	1
D	6082-002-043	Plaque de corne de roulette, côté droit du patient	1

6516-009-007 Rev AB.0 42 FR

Ensemble verrouillage de roulette réglable

6086-200-010 rév. A (référence uniquement)

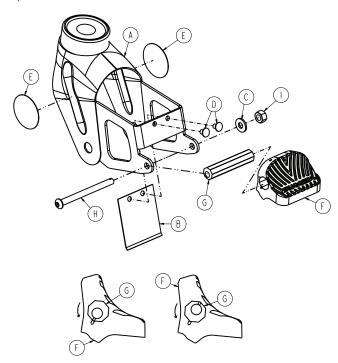


Élément	Numéro	Nom	Quantité
Α	6082-100-012	Fourche de la roulette	1
В	6080-100-032	Ressort	1
С	0011-456-000	Rondelle	1
D	0025-153-000	Rivet semi-tubulaire	2
E	6506-001-900	Étiquette	2
F	6080-300-030	Pédale, verrouillage de roulette réglable	1
G	6080-200-041	Douille octogonale, verrouillage de roulette réglable	1
Н	0004-098-000	Vis d'assemblage à tête ronde hexagonale	1
I	0016-118-000	Écrou de blocage central	1

FR 43 6516-009-007 Rev AB.0

Ensemble de roue moulée de 6 po

6060-002-010 rév. D (référence uniquement)

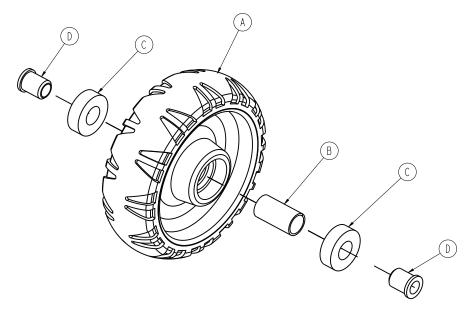


Élément	Numéro	Nom	Quantité
A	6060-002-045	Roue moulée de 6 po	1
В	6060-002-046	Entretoise de roulement	1
С	0081-226-000	Roulement	2
D	0715-001-255	Douille de roue	2

6516-009-007 Rev AB.0 44 FR

Roue de chargement, rigide


6500-101-086 rév. A (référence uniquement)

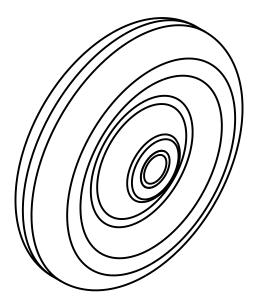

FR 45 6516-009-007 Rev AB.0

Roue, avant


6500-001-086 rév. A (référence uniquement)

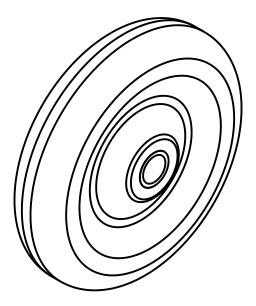

6516-009-007 Rev AB.0 46 FR

Option Steer-Lock, aucune - 6506-037-000

Rév. A (référence uniquement)

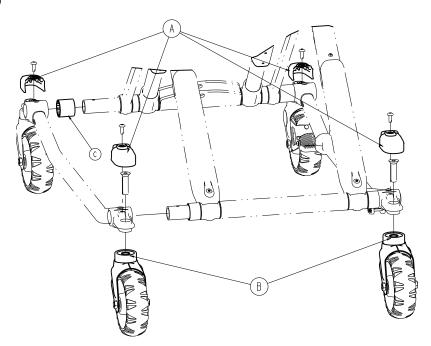


Élément	Numéro	Nom	Quantité
Α	6500-001-177	Couvercle de montage de roulette	4
В	6082-002-012	Ensemble de corne de roulette (page 42)	2
С	6500-001-230	Espaceur en plastique pour extrusion en plastique	1

FR 47 6516-009-007 Rev AB.0

Option Steer-Lock - 6506-038-000

Rév. A (référence uniquement)

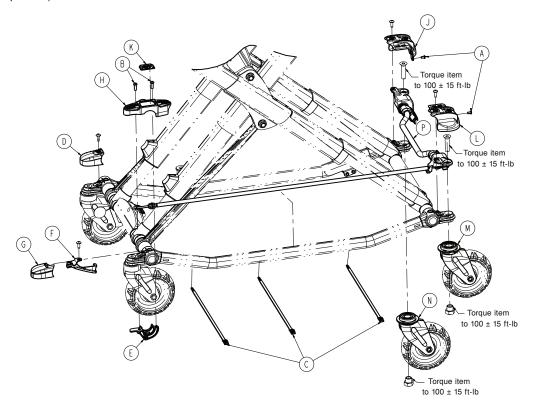


Élément	Numéro	Nom	Quantité
Α	0004-587-000	Vis d'assemblage à tête ronde	2
В	0004-592-000	Vis d'assemblage à tête ronde	2
С	0059-211-000	Attache de câble	3
D	6500-001-177	Couvercle de montage de la roulette	1
E	6500-002-243	Collerette de la pédale Steer-Lock, côté pieds	1
F	6500-002-244	Support de câble Steer-Lock	1
G	6500-002-245	Couvercle de montage de la roulette	1
Н	6500-002-246	Pédale surmoulée Steer-Lock, côté pieds	1
J	6500-002-247	Couvercle du boîtier Steer-Lock, côté tête	1
K	6500-002-248	Étiquette, pédale Steer-Lock, côté pieds	1
L	6500-002-249	Couvercle du boîtier Steer-Lock, côté tête	1
M	6500-002-255	Soudure de fourche de roulette Steer-Lock, côté gauche du patient	1
N	6500-002-260	Soudure de fourche de roulette Steer-Lock, côté droit du patient	1
Р	6506-002-265	Sous-ensemble Steer-Lock, côté tête (page 49)	1

6516-009-007 Rev AB.0 48 FR

Sous-ensemble Steer-Lock, côté tête

6506-002-265 rév. A (référence uniquement)

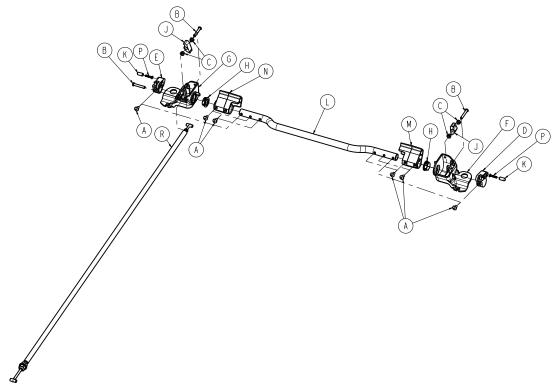


Élément	Numéro	Nom	Quantité
Α	0025-079-000	Rivet de la tête du dôme	6
В	0027-036-000	Broche fendue implantée autobloquante (SLIC)	3
С	0081-347-000	Roulement de bride	4
D	6500-002-230	Boîtier du piston Steer-Lock	1
E	6500-002-231	Boîtier du piston Steer-Lock	1
F	6500-002-234	Boîtier du mécanisme Steer-Lock	1
G	6500-002-235	Boîtier du mécanisme Steer-Lock	1
Н	6500-002-236	Douille à collerette Steer-Lock personnalisée	2
J	6500-002-237	Cliquet de verrouillage Steer-Lock	2
K	6500-002-238	Bouton du piston Steer-Lock	2
L	6500-002-240	Tube transversal Steer-Lock	1
M	6500-002-241	Pédale Steer-Lock, côté tête	1
N	6500-002-251	Pédale Steer-Lock, côté tête	1
Р	6500-002-252	Ressort de compression	2
R	6500-002-250	Ensemble tige flexible de poussée ou traction Steer-Lock	1

FR 49 6516-009-007 Rev AB.0

Ensemble tube de levage externe, pivot du châssis

6500-301-021 rév. B (référence uniquement)

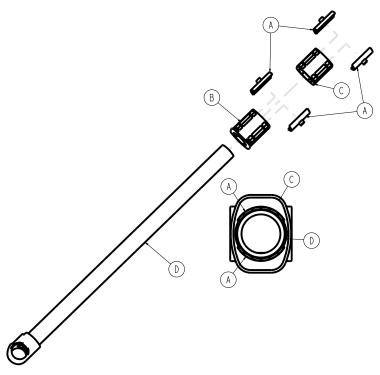


Élément	Numéro	Nom	Quantité
A	6500-101-327	Demi-coussinet de bielle	4
В	6500-001-328	Support de roulement, inférieur	1
С	6500-001-329	Support de roulement, central	1
D	6500-301-050	Soudure du tube de levage externe	1

6516-009-007 Rev AB.0 50 FR

Ensemble tube de levage interne, pivot du châssis

6500-301-022 rév. C (référence uniquement)

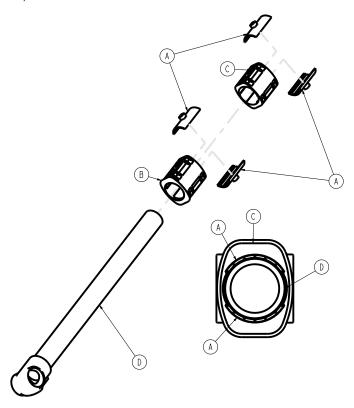


Élément	Numéro	Nom	Quantité
Α	6500-101-327	Demi-coussinet de bielle	4
В	6500-001-328	Support de roulement, inférieur	1
С	6500-001-329	Support de roulement, central	1
D	6500-301-051	Soudure du tube de levage, pivot du châssis	1

FR 51 6516-009-007 Rev AB.0

Tube de levage interne, pivot du plan de couchage, ensemble côté droit du patient

6500-001-034 rév. F (référence uniquement)

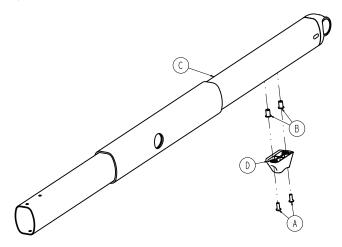


Élément	Numéro	Nom	Quantité
A	0004-634-000	Vis d'assemblage à tête ronde	2
В	0055-100-075	Écrou	2
С	6500-001-355	Soudure du tube de levage interne	1
D	6500-001-125	Butée fixe	1

6516-009-007 Rev AB.0 52 FR

Tube de levage interne, pivot du plan de couchage, ensemble côté gauche du patient

6500-001-035 rév. F (référence uniquement)

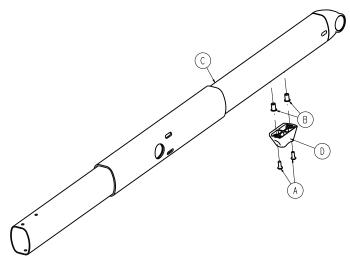


Élément	Numéro	Nom	Quantité
Α	0004-634-000	Vis d'assemblage à tête ronde	2
В	0055-100-075	Écrou	2
С	6500-301-053	Soudure du tube de levage interne	1
D	6500-001-125	Butée fixe	1

FR 53 6516-009-007 Rev AB.0

Sous-ensemble rail externe, côté droit du patient

6516-001-027 rév. B (référence uniquement)

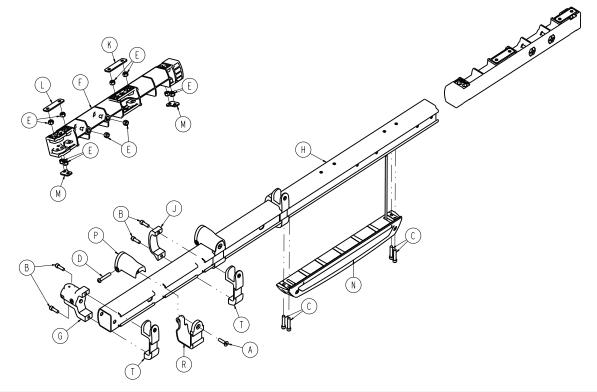


Élément	Numéro	Nom	Quantité
Α	0001-004-011	Vis d'assemblage à tête plate	2
В	0004-591-000	Vis d'assemblage à six pans creux	6
С	0004-613-000	Vis d'assemblage à six pans creux	4
D	0004-848-000	Vis d'assemblage à tête ronde	2
E	0016-028-000	Écrou hexagonal Fiberlock	10
F	6500-001-098	Butée fixe du plan de couchage, interne	1
G	6500-001-102	Support d'interface base/plan de couchage	1
Н	6500-001-114	Extrusion du rail externe	1
J	6500-001-117	Pince de barrière	2
K	6500-001-243	Plaque d'appui pour support de perfusion	1
L	6500-001-244	Plaque de support pour clip IV	1
M	6500-001-245	Plaque du support du boîtier du capteur	2
N	6500-002-028	Ensemble capteurs Hall (page 56)	1
Р	6500-002-130	Support du plan de couchage	2
R	6500-002-131	Support de plan de couchage, intérieur	2
Т	6510-001-115	Support de barrière	3

6516-009-007 Rev AB.0 54 FR

Sous-ensemble rail externe, côté gauche du patient

6516-001-028 rév. B (référence uniquement)

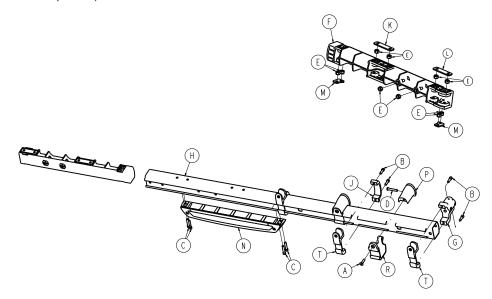


Élément	Numéro	Nom	Quantité
Α	0001-004-011	Vis d'assemblage à tête plate	2
В	0004-591-000	Vis d'assemblage à six pans creux	6
С	0004-613-000	Vis d'assemblage à six pans creux	4
D	0004-848-000	Vis d'assemblage à tête ronde	2
E	0016-028-000	Écrou hexagonal Fiberlock	10
F	6500-001-098	Butée fixe du plan de couchage, interne	1
G	6500-001-102	Support d'interface base/plan de couchage	1
Н	6500-001-115	Extrusion du rail externe	1
J	6500-001-117	Pince de barrière	2
K	6500-001-243	Plaque d'appui pour support de perfusion	1
L	6500-001-244	Plaque de support pour clip IV	1
M	6500-001-245	Plaque du support du boîtier du capteur	2
N	6500-002-029	Ensemble boîtier du capteur (page 57)	1
Р	6500-002-130	Support du plan de couchage	2
R	6500-002-131	Support de plan de couchage, intérieur	2
Т	6510-001-115	Support de barrière	3

FR 55 6516-009-007 Rev AB.0

Ensemble capteurs Hall

6500-002-028 rév. A (référence uniquement)

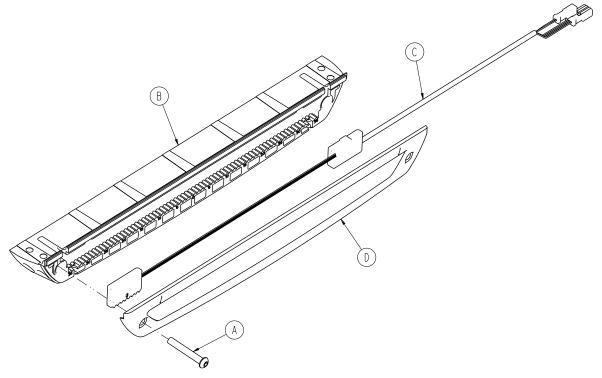


Élément	Numéro	Nom	Quantité
Α	0004-596-000	Vis d'assemblage à tête ronde	1
В	6500-001-124	Boîtier du capteur	1
С	6500-001-160	Capteur à effet Hall	1
D	6500-001-199	Couvercle du boîtier	1

6516-009-007 Rev AB.0 56 FR

Ensemble boîtier du capteur

6500-002-029 rév. A (référence uniquement)

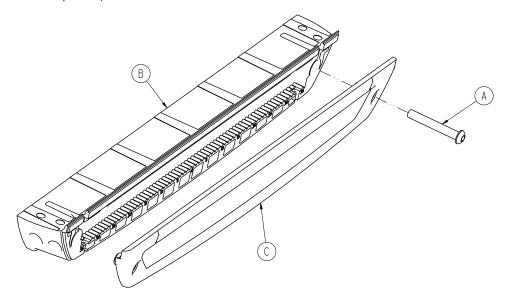


Élément	Numéro	Nom	Quantité
Α	0004-596-000	Vis d'assemblage à tête ronde	1
В	6500-001-124	Boîtier du capteur	1
С	6500-001-199	Couvercle du boîtier	1

FR 57 6516-009-007 Rev AB.0

Ensemble centrale électrique

6516-001-014 rév. D (référence uniquement)

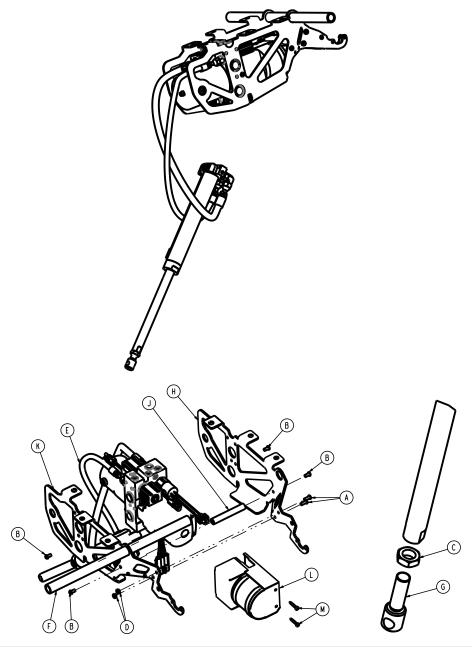

Élément	Numéro	Nom	Quantité
A	0004-577-000	Vis d'assemblage à tête ronde	2
В	0004-589-000	Vis d'assemblage à tête ronde	4
С	0015-052-000	Contre-écrou hexagonal	1
D	0016-102-000	Écrou hexagonal Nylock	2
E	6500-101-030	Sous-ensemble hydraulique (page 60)	1
F	6500-001-105	Support du plan de couchage, tube transversal	1
G	6500-001-169	Vérin, extrémité de la tige	1
Н	6500-002-194	Montage du moteur	1
J	6500-001-212	Barre transversale de montage du moteur	1
K	6500-002-294	Montage du moteur	1


6516-009-007 Rev AB.0 58 FR

Élément	Numéro	Nom	Quantité
L	6506-001-820	Soudure du carter du moteur	1
M	0023-333-000	Vis métallique à tête cylindrique	2

FR 59 6516-009-007 Rev AB.0

Sous-ensemble hydraulique

6500-101-030 rév. AC (référence uniquement)

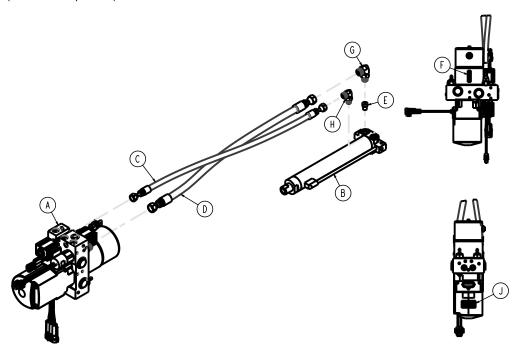


Élément	Numéro	Nom	Quantité
Α	6500-101-214	Ensemble collecteur	1
В	6500-002-034	Ensemble vérin hydraulique	1
С	6500-001-211	Ensemble de tuyaux hydrauliques	1
D	6500-001-210	Tuyau hydraulique	1
E	Depatie 8506-1.9	Fusible de vélocité Vonberg	1
F	Étiquette de code-barres d fusion de l'électrode Depatie	le Étiquette du numéro de série	1
G	6500-001-296	Raccord de tuyau côté capuchon, cylindre	1
Н	6500-001-297	Raccord de tuyau côté tige, cylindre	1
J	Étiquette PPQC Depatie	Étiquette, contrôle qualité	1


6516-009-007 Rev AB.0 60 FR

Ensemble côté pieds


6500-102-015 rév. AA (référence uniquement)

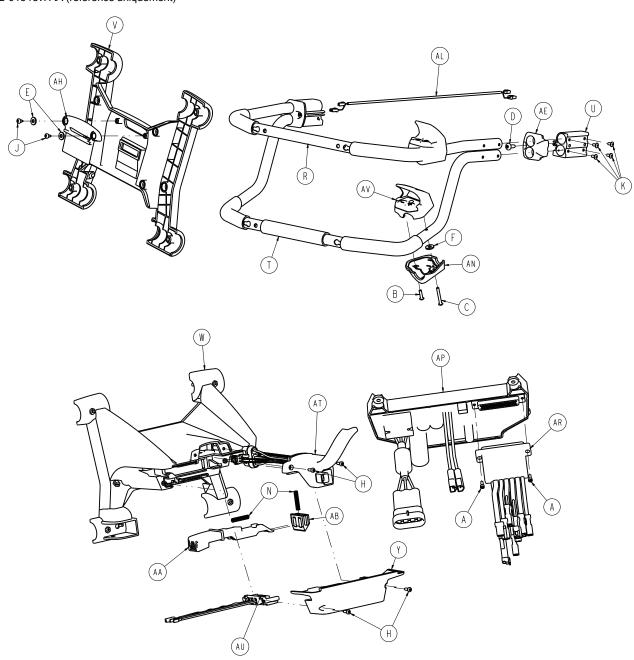


FR 61 6516-009-007 Rev AB.0

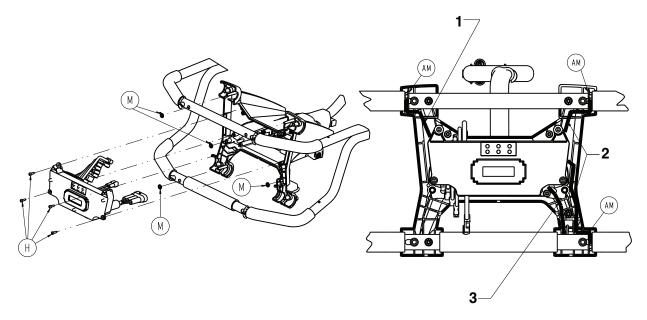

1	Acheminer le câble du capteur à effet Hall autour de l'élément (AM) et à travers cette zone
2	Acheminer les câbles de l'interrupteur autour de l'élément (AM) et à travers cette zone
3	Acheminer le câble de déblocage manuel à travers cette zone

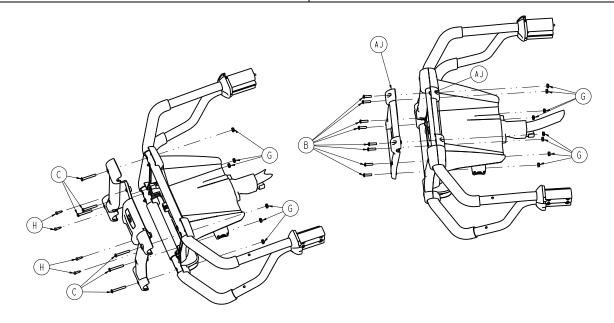

6516-009-007 Rev AB.0 62 FR

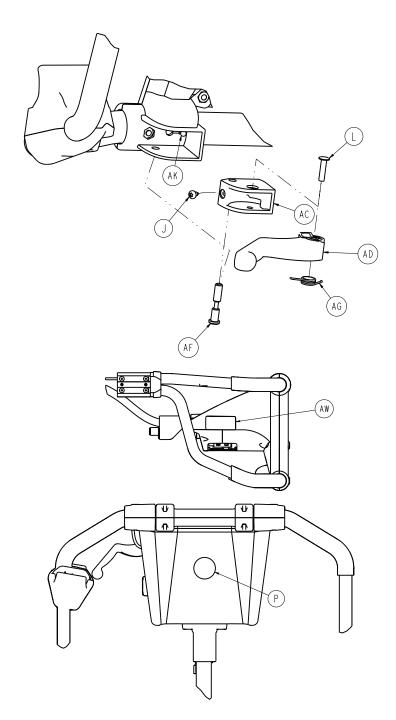

Élément	Numéro	Nom	Quantité
Α	0004-874-000	Vis d'assemblage à six pans creux	2
В	0004-614-000	Vis d'assemblage à tête ronde	10
С	0004-615-000	Vis d'assemblage à tête ronde	8
D	0007-086-000	Vis à tête en treillis	2
E	0011-062-000	Rondelle	2
F	0011-543-000	Rondelle	2
G	0016-131-000	Écrou hexagonal Nylock	14
Н	0023-162-000	Vis Delta	12
J	0023-163-000	Vis Delta	3
K	0025-079-000	Rivet de la tête du dôme	8


FR 63 6516-009-007 Rev AB.0

Élément	Numéro	Nom	Quantité
L	0025-187-000	Rivet semi-tubulaire	1
М	0028-116-000	Écrou de poussée	4
N	0038-572-000	Ressort de compression	2
P	6506-001-900	Etiquette, consulter le manuel d'utilisation	1
R	6500-001-131	Barre de levage supérieure	1
Т	6500-001-132	Barre de levage inférieure	1
U	6500-001-133	Support extrudé usiné	2
V	6500-001-134	Boîtier de la batterie, façade	1
W	6500-001-135	Boîtier du côté pieds, plaque supérieure	1
Υ	6500-001-136	Boîtier côté pieds, plaque inférieure	1
AA	6500-001-138	Bouton de déblocage de la batterie	1
AB	6500-001-139	Verrouillage du déblocage de la batterie	1
AC	6500-001-140	Pivot de l'actionneur de déblocage manuel	1
AD	6500-001-141	Levier de l'actionneur de déblocage manuel	1
AE	6500-001-144	Capuchon de transition	2
AF	6500-001-146	Broche pivotante du déblocage manuel	1
AG	6500-001-147	Ressort unique	1
AH	6500-001-153	Panneau lumineux orb	1
AJ	6500-001-154	Poignée de traction, extérieure	2
AK	6500-001-156	Ensemble de câble de déblocage manuel	1
AL	6500-001-161	Câble à effets Hall	1
AM	6500-001-275	Clip pour chemin de câbles	3
AN	6500-001-358	Bouton du boîtier inférieur, côté pieds	2
AP	6500-102-014	Carte de commande	1
AR	6500-002-103	Clé électronique de civière	1
AT	6500-002-159	Ensemble de câbles	1
AU	6500-102-216	Ensemble de câble de connexion de civière	1
AV	650600010016	Ensemble bouton (page 66)	2
AW	6500-001-356	Étiquette, alimentation SMRT	1

6516-009-007 Rev AB.0 64 FR

Ensemble traverse

6510-001-013 rév. A (référence uniquement)

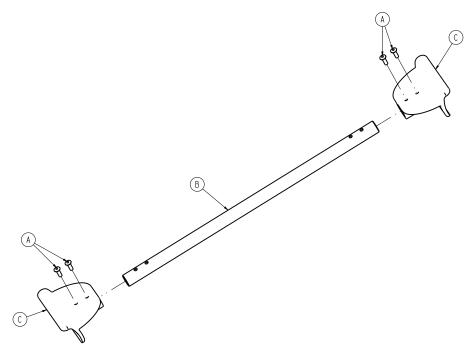


Élément	Numéro	Nom	Quantité
Α	0025-133-000	Rivet	4
В	6500-001-107	Traverse du plan de couchage	1
С	6500-001-109	Support de déclive	2

FR 65 6516-009-007 Rev AB.0

Ensemble bouton

650600010016 rév. AA (référence uniquement)

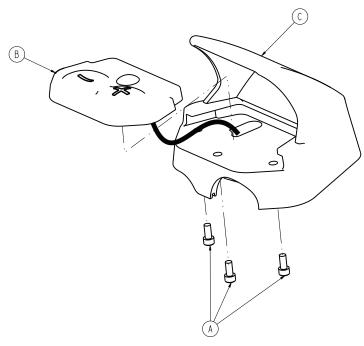


Élément	Numéro	Nom	Quantité
Α	37J102-1	Vis d'assemblage à six pans creux	3
В	650600010130	Interrupteur	1
С	6500-001-359	Bouton du boîtier supérieur, côté pieds	1

6516-009-007 Rev AB.0 66 FR

Option de section tête pour crochet à ramure uniquement - 6516-043-000

Rév. D (référence uniquement)

FR

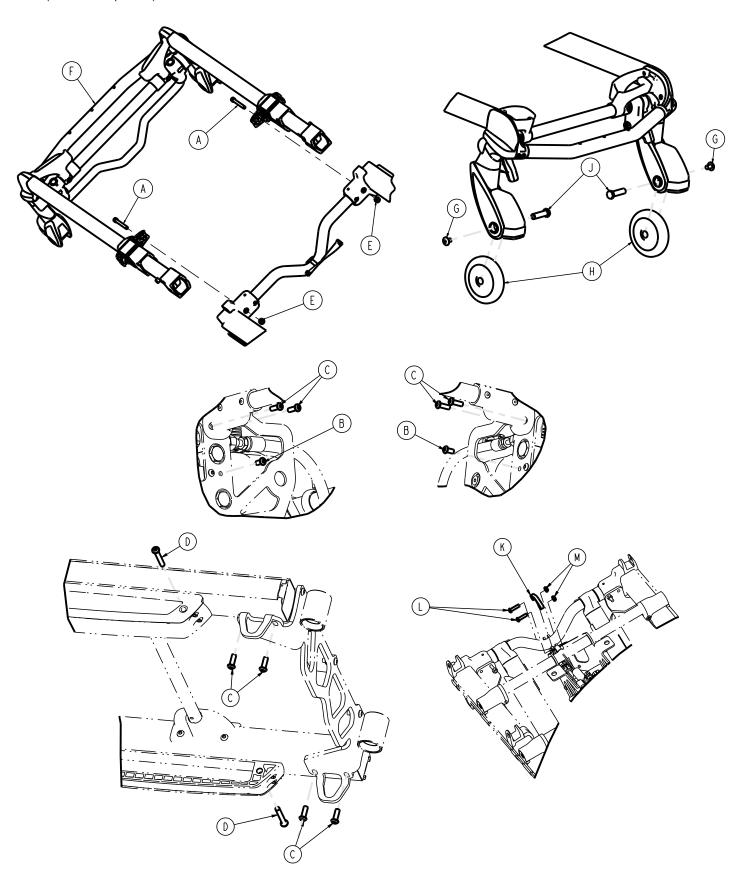


67 6516-009-007 Rev AB.0

Élément	Numéro	Nom	Quantité
Α	0004-517-000	Vis d'assemblage à six pans creux	2
В	0004-589-000	Vis d'assemblage à tête ronde	2
С	0004-593-000	Vis d'assemblage à tête ronde	8
D	0004-596-000	Vis d'assemblage à tête ronde	2
E	0016-028-000	Écrou hexagonal Fiberlock	2
F	650600020020	Section tête avec crochet à ramure uniquement, courbée en option - 650600020020 (page 80)	1
G	0007-556-000	Vis mécanique à tête bombée	2
Н	6500-001-086	Roue, avant	2
J	6500-002-106	Fixation de la roue de chargement	2
K	6500-002-195	Collier	1
L	0004-594-000	Vis d'assemblage à tête ronde	2
М	0016-102-000	Écrou hexagonal Nylock	2


6516-009-007 Rev AB.0 68 FR

Option compatible avec Power-LOAD - 6516-144-000

Rév. AA (référence uniquement)

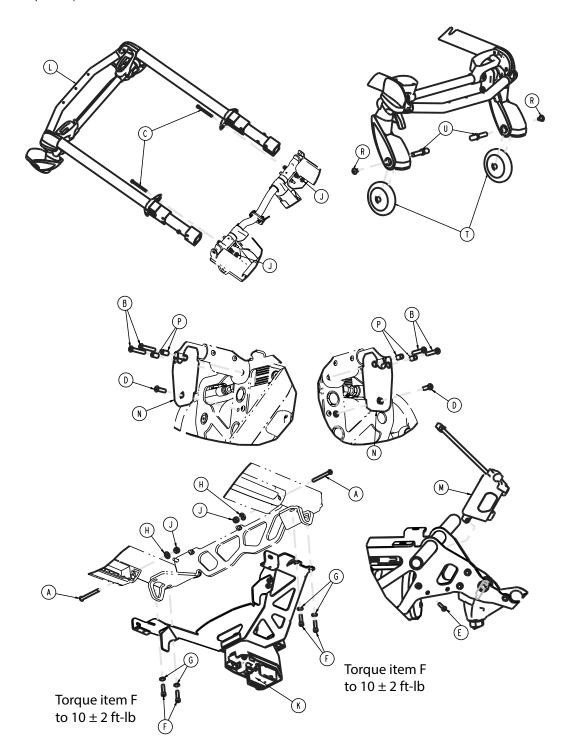

FR 69 6516-009-007 Rev AB.0

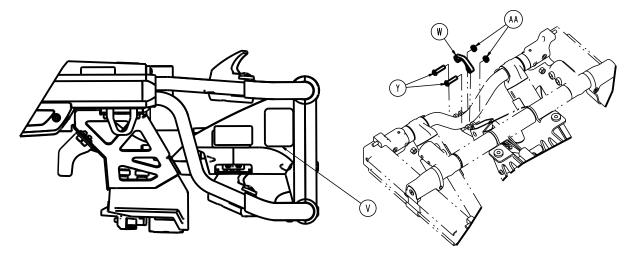


Élément	Numéro	Nom	Quantité
Α	0004-387-000	Vis d'assemblage à tête ronde	2
В	0004-395-000	Vis d'assemblage à tête ronde	4
С	0004-517-000	Vis d'assemblage à six pans creux	2
D	0004-593-000	Vis d'assemblage à tête ronde	2
E	0004-614-000	Vis d'assemblage à tête ronde	1
F	0004-661-000	Vis d'assemblage à six pans creux	4
G	0011-065-000	Rondelle	4
Н	0011-077-000	Rondelle	2
J	0016-028-000	Écrou hexagonal Fiberlock	4
K	6500-002-013	Ensemble de fixation côté pieds (compatible avec Power-LOAD) (page 86)	1
L	6500-002-020	Section tête en option - 6500-002-020 (page 78)	1
M	6500-002-100	Carte de communication de la civière	1
N	6500-002-123	Entretoise pour bras de civière	2
Р	6500-002-124	Gaine d'écarteur du bras de la civière	4
R	0007-556-000	Vis mécanique à tête bombée	2
Т	6500-101-086	Roue de chargement, rigide	2
U	6500-002-104	Goupille de roue porteuse	2
V	6516-101-101	Étiquette, FCC	1
W	6500-002-195	Collier	1
Υ	0004-594-000	Vis d'assemblage à tête ronde	2
AA	0016-102-000	Écrou hexagonal Nylock	2


6516-009-007 Rev AB.0 70 FR

Option Performance-LOAD - 6516-034-001

Rév. AA (référence uniquement)

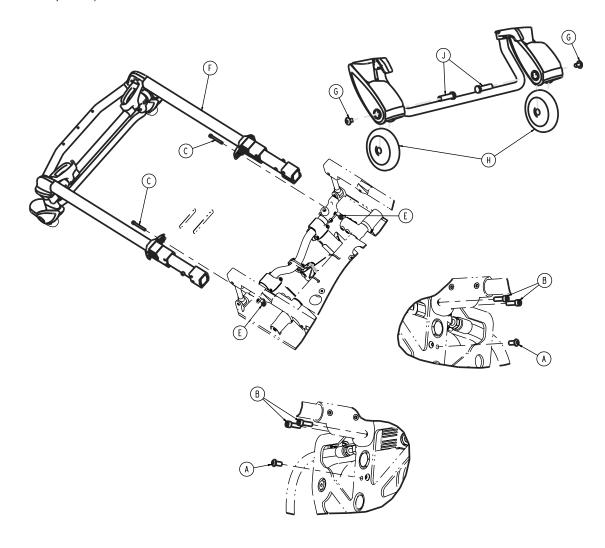

FR 71 6516-009-007 Rev AB.0

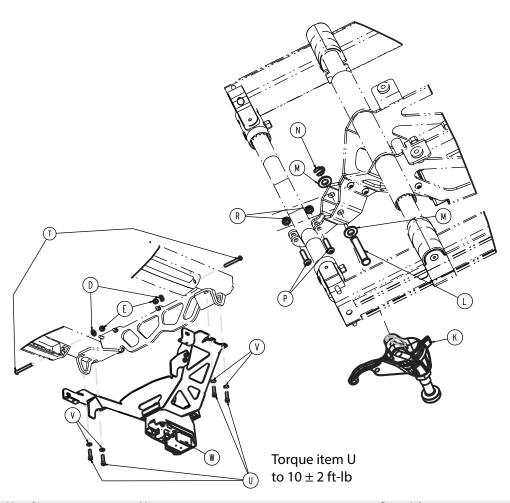


Élément	Numéro	Nom	Quantité
Α	0004-589-000	Vis d'assemblage à tête ronde	6
В	0004-591-000	Vis d'assemblage à six pans creux	4
С	0004-517-000	Vis d'assemblage à six pans creux	2
D	0011-077-000	Rondelle	2
E	0016-028-000	Écrou hexagonal Fiberlock	6
F	6500-002-020	Section tête	1
G	0007-556-000	Vis mécanique à tête bombée	2
Н	6500-101-086	Roue de chargement, rigide	2
J	6500-002-106	Entretoise pour roue de chargement	2
K	6392-001-062	Ensemble de forgeage du côté tête	1
L	6085-101-143	Goupille du vérin du relève-buste	1
M	0011-004-000	Rondelle	2
N	0028-181-000	Anneau Truarc	1
Р	0004-594-000	Vis d'assemblage à tête ronde	2
R	0016-102-000	Écrou hexagonal Nylock	2
Т	0004-387-000	Vis d'assemblage à tête ronde	2
U	0004-661-000	Vis d'assemblage à six pans creux	4
V	0011-065-000	Rondelle	4
W	6500-002-013	Ensemble de fixation côté pieds (compatible avec Power-LOAD) (page 86)	1


6516-009-007 Rev AB.0 72 FR

Options Power-LOAD et Performance-LOAD - 6516-034-002

Rév. AA (référence uniquement)

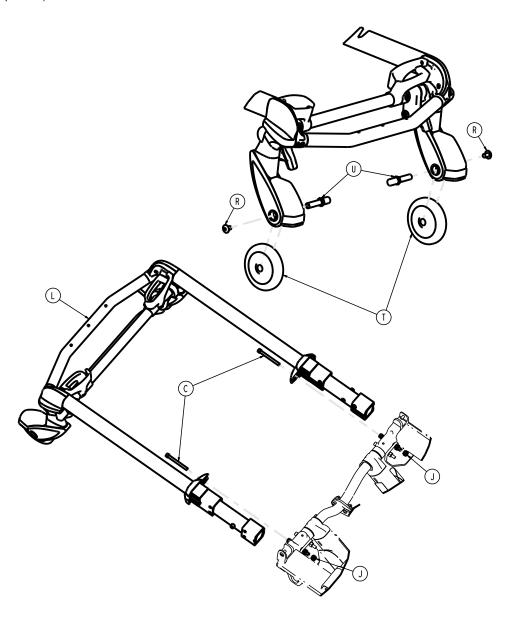

FR 73 6516-009-007 Rev AB.0

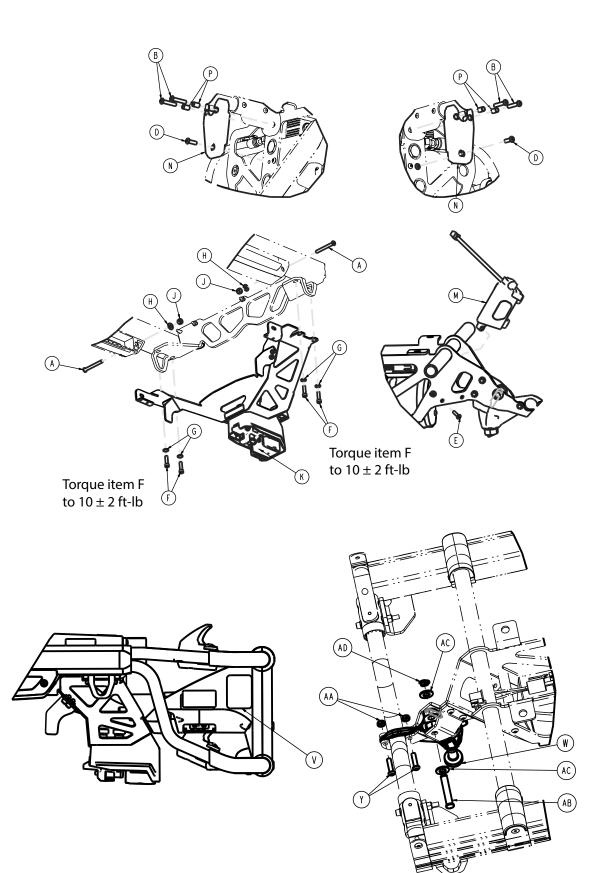

Élément	Numéro	Nom	Quantité
Α	0004-387-000	Vis d'assemblage à tête ronde	2
В	0004-395-000	Vis d'assemblage à tête ronde	4
С	0004-517-000	Vis d'assemblage à six pans creux	2


6516-009-007 Rev AB.0 74 FR

Élément	Numéro	Nom	Quantité
D	0004-593-000	Vis d'assemblage à tête ronde	2
E	0004-614-000	Vis d'assemblage à tête ronde	1
F	0004-661-000	Vis d'assemblage à six pans creux	4
G	0011-065-000	Rondelle	4
Н	0011-077-000	Rondelle	2
J	0016-028-000	Écrou hexagonal Fiberlock	4
K	6500-002-013	Ensemble de fixation côté pieds (compatible avec Power-LOAD) (page 86)	1
L	6500-002-020	Section tête	1
M	6500-002-100	Carte de communication	1
N	6500-002-123	Ecarteur de bras	2
P	6500-002-124	Gaine d'écarteur du bras	4
R	0007-556-000	Vis mécanique à tête bombée	2
Т	6500-101-086	Roue de chargement, rigide	2
U	6500-002-104	Goupille de roue porteuse	2
V	6516-101-101	Étiquette FCC	1
W	6392-001-062	Ensemble de forgeage du côté tête	1
Υ	0004-594-000	Vis d'assemblage à tête ronde	2
AA	0016-102-000	Écrou hexagonal Nylock	2
AB	6085-101-143	Goupille du vérin du relève-buste	1
AC	0011-004-000	Rondelle	2
AD	0028-181-000	Anneau Truarc	1

FR 75 6516-009-007 Rev AB.0

Section tête (non compatible avec Power-LOAD) en option - 6506-001-020

Rév. AA (référence uniquement)

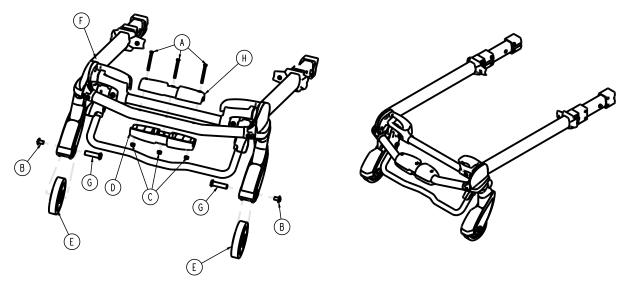


Élément	Numéro	Nom	Quantité
Α	0004-656-000	Vis d'assemblage à six pans creux	3
В	0007-556-000	Vis mécanique à tête bombée	2
С	0016-002-000	Écrou hexagonal Fiberlock	3
D	6085-001-174	Porte-bouteille d'oxygène, inférieur	1
E	6500-001-086	Roue avant	2
F	650600020020	Section tête avec crochet à ramure uniquement, courbée en option - 650600020020 (page 80)	1
G	6500-002-106	Fixation de la roue de chargement	2
Н	6500-002-156	Guide supérieur, côté tête	1

6516-009-007 Rev AB.0 76 FR

Section tête (compatible avec Power-LOAD) en option - 6506-001-021

Rév. B (référence uniquement)

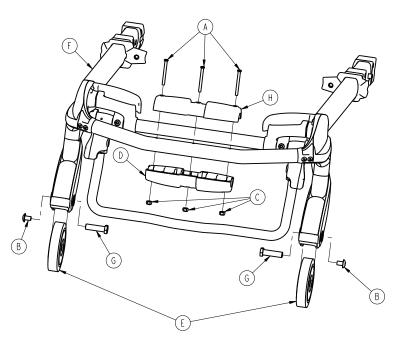


Élément	Numéro	Nom	Quantité
Α	0004-656-000	Vis d'assemblage à six pans creux	3
В	0007-556-000	Vis mécanique à tête bombée	2
С	0016-002-000	Écrou hexagonal Fiberlock	3
D	6085-001-174	Porte-bouteille d'oxygène, inférieur	1
E	6500-101-086	Roue de chargement, rigide	2
F	6500-002-020	Section tête en option - 6500-002-020 (page 78)	1
G	6500-002-104	Goupille de roue porteuse	2
Н	6500-002-156	Guide supérieur, côté tête	1

FR 77 6516-009-007 Rev AB.0

Section tête en option - 6500-002-020

Rév. AA (référence uniquement)

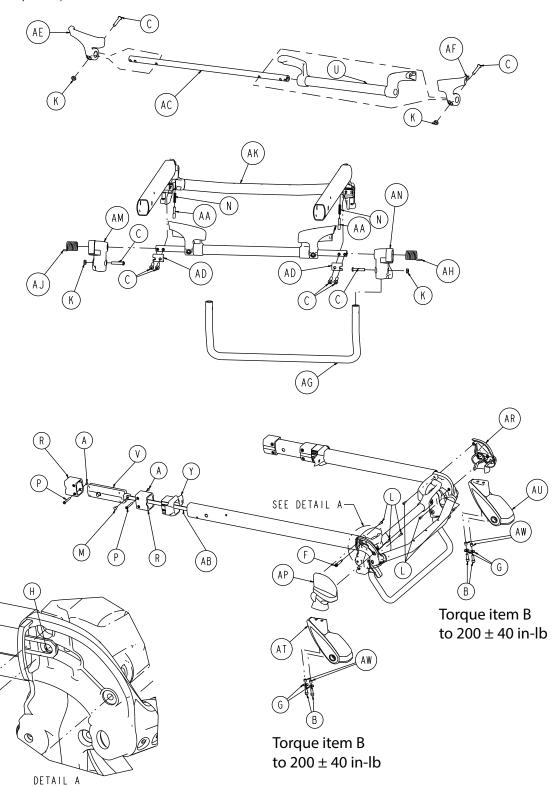

Remarque - Placer la rondelle (élément H) entre la barre de déverrouillage et le forgeage.


6516-009-007 Rev AB.0 78 FR

Élément	Numéro	Nom	Quantité
Α	0004-168-000	Vis d'assemblage à tête ronde	4
В	0004-591-000	Vis d'assemblage à six pans creux	4
С	0004-612-000	Vis d'assemblage à tête ronde	8
F	0008-030-000	Vis à épaulement à tête creuse	2
G	0011-624-000	Rondelle	4
Н	0014-002-000	Rondelle	2
K	0016-102-000	Écrou hexagonal Nylock	4
L	0023-162-000	Vis Delta	6
M	0025-126-000	Rivet semi-tubulaire	2
N	0038-570-000	Ressort de compression	2
Р	6085-001-169	Écrou de section tête	4
R	6085-001-170	Roulement interne	4
U	6500-001-023	Ensemble de déclencheur de tête	1
V	6500-001-026	Ensemble de verrouillage de la section tête (page 83)	2
Υ	6500-001-087	Roulement à chapeau	2
AA	6500-001-093	Broche de verrouillage de la barre de sécurité	2
AB	6500-001-096	Poignée de déblocage de la section tête	2
AC	6500-001-220	Tube transversal à pivot de la section tête	1
AD	6500-001-221	Clamp de tube transversal	2
AE	6500-001-280	Protège-tête, côté droit du patient	1
AF	6500-001-281	Protection de la section tête, côté gauche du patient	1
AG	6500-001-322	Barre de sécurité de la section tête coulissante	1
AH	6500-001-325	Ressort de torsion de la barre de sécurité, côté gauche du patient	1
AJ	6500-001-326	Ressort de torsion de la barre de sécurité, côté droit du patient	1
AK	650700080150	Raccordement de la section tête (page 82)	1
AM	6500-002-107	Pivot de la barre de sécurité, côté droit du patient	1
AN	6500-002-108	Pivot de la barre de sécurité, côté gauche du patient	1
AP	6500-002-109	Cache de la fourche de la roue de chargement, côté gauche du patient	1
AR	6500-002-110	Cache de la fourche de la roue de chargement, côté droit du patient	1
AT	6500-002-120	Fourche de la roue de chargement, côté gauche du patient	1
AU	6500-002-121	Fourche de la roue de chargement, côté droit du patient	1
AW	6500-002-114	Gaine de limitation de compression	4

FR 79 6516-009-007 Rev AB.0

Section tête avec crochet à ramure uniquement, courbée en option - 650600020020

Rév. AA (référence uniquement)

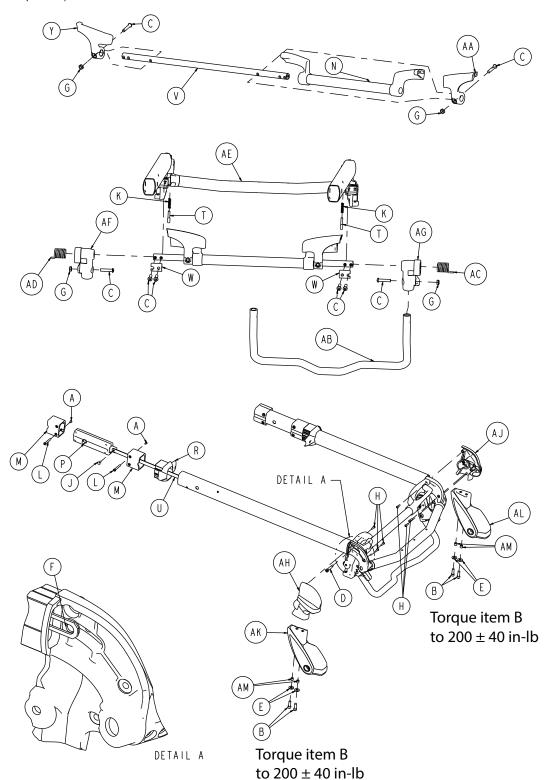

Élément	Numéro	Nom	Quantité
Α	0004-168-000	Vis d'assemblage à tête ronde	4
В	0004-591-000	Vis d'assemblage à six pans creux	4
С	0004-612-000	Vis d'assemblage à tête ronde	8


6516-009-007 Rev AB.0 80 FR

Élément	Numéro	Nom	Quantité
D	0008-030-000	Vis à épaulement à tête creuse	2
E	0011-624-000	Rondelle	4
F	0014-002-000	Rondelle	2
G	0016-102-000	Écrou hexagonal Nylock	4
Н	0023-162-000	Vis Delta	6
J	0025-126-000	Rivet semi-tubulaire	2
K	0038-570-000	Compression, guide	2
L	6085-001-169	Écrou de section tête	4
М	6085-001-170	Roulement interne	4
N	6500-001-023	Ensemble de déclencheur de tête	1
P	6500-001-026	Ensemble de verrouillage de la section tête (page 83)	2
R	6500-001-087	Roulement à chapeau	2
Т	6500-001-093	Broche de verrouillage de la barre de sécurité	2
U	6500-001-096	Poignée de déblocage de la section tête	2
V	6500-001-220	Tube transversal à pivot de la section tête	1
W	6500-001-221	Clamp de tube transversal	2
Υ	6500-001-280	Protège-tête, côté droit du patient	1
AA	6500-001-281	Protection de la section tête, côté gauche du patient	1
AB	6506-001-322	Barre de sécurité de section tête courbée	1
AC	6500-001-325	Ressort de torsion de la barre de sécurité, côté gauche du patient	1
AD	6500-001-326	Ressort de torsion de la barre de sécurité, côté droit du patient	1
AE	650700080150	Raccordement de la section tête (page 82)	1
AF	6500-001-107	Pivot du crochet de sécurité, côté droit du patient	1
AG	6500-001-108	Pivot du crochet de sécurité, côté gauche du patient	1
AH	6500-001-109	Cache de la fourche de la roue de chargement, côté gauche du patient	1
AJ	6500-001-110	Cache de la fourche de la roue de chargement, côté droit du patient	1
AK	6500-001-120	Fourche de la roue de chargement, côté gauche du patient	1
AL	6500-001-121	Fourche de la roue de chargement, côté droit du patient	1
AM	6500-001-114	Gaine de limitation de compression	4

FR 81 6516-009-007 Rev AB.0

Raccordement de la section tête

650700080150 rév. AA (référence uniquement)

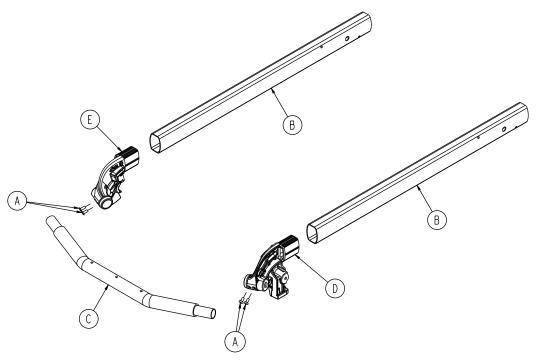


Élément	Numéro	Nom	Quantité
Α	0025-079-000	Rivet de la tête du dôme	4
В	6085-001-144	Tube télescopique de la section tête	2
С	6500-001-084	Barre de levage, avant	1
D	6500-002-080	Forgeage roue porteur, côté droit du patient	1
Е	6500-002-081	Forgeage roue porteur, côté gauche du patient	1

6516-009-007 Rev AB.0 82 FR

Ensemble de verrouillage de la section tête

6500-001-026 rév. C (référence uniquement)

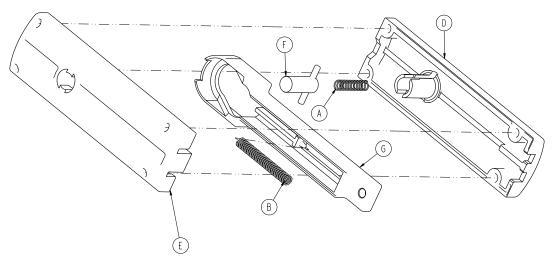


Élément	Numéro	Nom	Quantité
Α	0038-570-000	Ressort de compression	1
В	0038-134-000	Ressort de compression	1
D	6500-001-091	Boîtier du loquet supérieur	1
E	6500-001-092	Boîtier du loquet inférieur	1
F	6500-001-025	Ensemble de verrouillage	1
G	6500-001-095	Lame d'activation	1

FR 83 6516-009-007 Rev AB.0

Ensemble dispositif d'arrêt des fixations internes en option - 6500-001-027

Rév. C (référence uniquement)

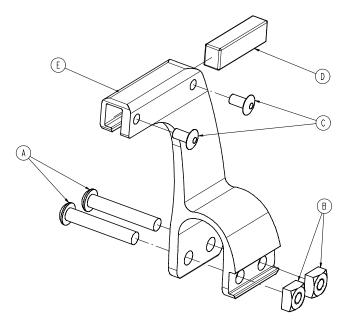


Élément	Numéro	Nom	Quantité
Α	0004-376-000	Vis d'assemblage à tête ronde	2
В	0015-016-000	Écrou carré	2
С	0025-079-000	Rivet de la tête du dôme	2
D	6500-001-271	Aimant d'arrêt d'ambulance	1
E	6500-001-272	Porte-aimant d'arrêt du dispositif de fixation	1

6516-009-007 Rev AB.0 84 FR

Porte-bouteille d'oxygène en option pour la section tête, aucun - 6506-036-000

Rév. A (référence uniquement)

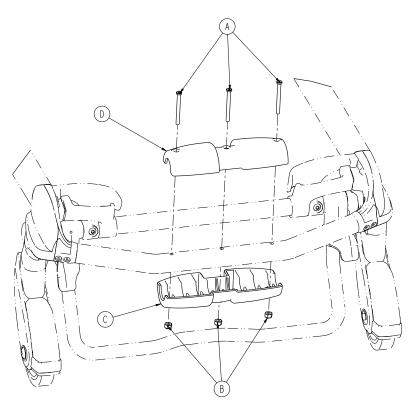


Élément	Numéro	Nom	Quantité
Α	0004-656-000	Vis d'assemblage à six pans creux	3
В	0016-002-000	Écrou hexagonal Fiberlock	3
С	6085-001-174	Porte-bouteille d'oxygène, inférieur	1
D	6500-002-156	Guide supérieur, côté tête	1


FR 85 6516-009-007 Rev AB.0

Ensemble de fixation côté pieds (compatible avec Power-LOAD)

6500-002-013 rév. AD (référence uniquement)

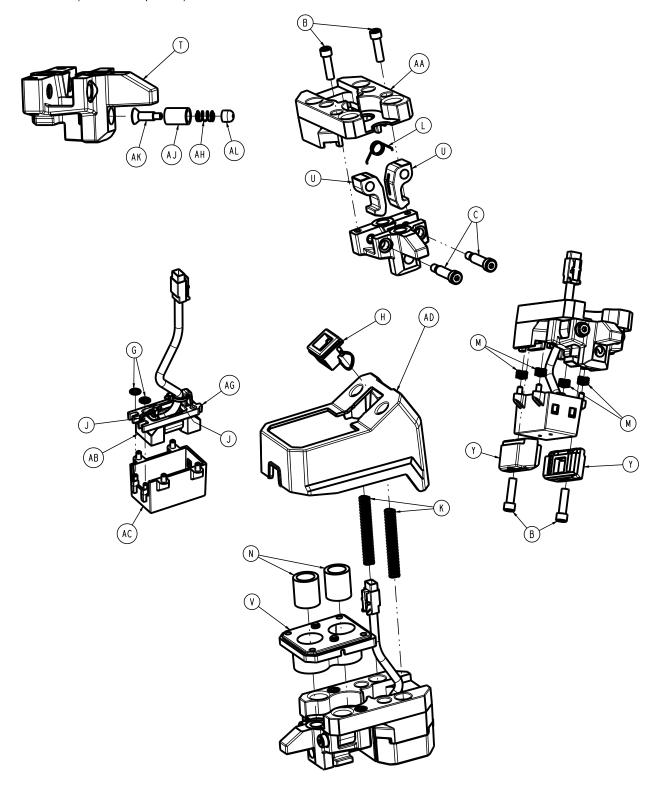

6516-009-007 Rev AB.0 86 FR

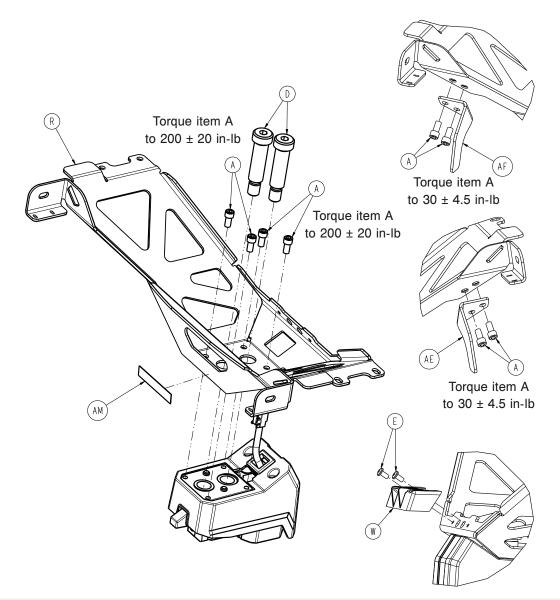

Élément	Numéro	Nom	Quantité
Α	0004-660-000	Vis d'assemblage à six pans creux	8
В	0004-661-000	Vis d'assemblage à six pans creux	4
С	0008-088-000	Vis à tête creuse	2
D	0008-087-000	Vis à tête creuse	2
E	700000660477	Vis à roulement à tête cylindrique	2
G	0028-217-000	Écrou de poussée	2
Н	0037-248-000	Douille de décharge de traction à poser	1
J	0038-111-000	Attache de câble	2
K	0038-889-000	Câble de compression	2
L	0038-891-000	Ressort de torsion	1
M	0038-900-000	Ressort ondulé	4
N	0081-437-000	Roulement à douille	2
R	6500-002-050	Soudure du support	1
Т	650000020111	Guide de fixation du côté pieds, usiné	1
U	6500-002-112	Crochet de fixation côté pieds	2
V	650001020113	Fixation de plaque de roulement côté pieds	1

FR 87 6516-009-007 Rev AB.0

Élément	Numéro	Nom	Quantité
W	6500-002-119	Écarteur de fixation côté pieds	1
Υ	6500-002-122	Coussin d'usure de la fixation côté pieds	2
AA	650001020130	Plaque flottante, usinée	1
AB	6500-002-133	Spirale secondaire	1
AC	6500-002-135	Porte-bobine de fixation côté pieds	1
AD	6500-002-136	Boîtier de la fixation côté pieds	1
AE	6500-002-146	Crochet de fixation côté pieds, côté droit du patient	1
AF	6500-002-147	Crochet de fixation du côté pieds, côté gauche du patient	1
AG	6500-002-144	Sangle d'arrimage de la spirale	1
AH	0038-001-012	Câble de compression	1
AJ	6500-002-148	Boîtier du piston	1
AK	6500-002-149	Piston	1
AL	6500-002-152	Capuchon du piston	1
AM	650600010927	Étiquette, CAN RSS-216	1


Remarques:

2	Laisser suffisamment de mou dans le câble dans la zone indiquée pour permettre à l'élément CA d'avoir une course complète après le montage
4	Installer l'attache éclair autour de la grosse gaine métallique, comme illustré
5	Laisser le réducteur de tension desserré sur le guide

6516-009-007 Rev AB.0 88 FR

Montant de retenue de civière en option, côté droit du patient - 6085-033-000

Rév. E (référence uniquement)

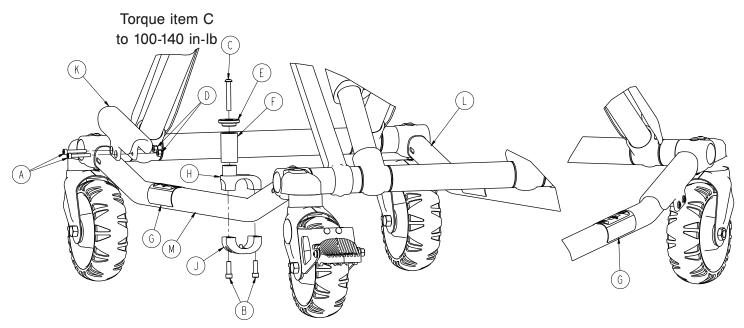


Élément	Numéro	Nom	Quantité
Α	0004-160-000	Vis d'assemblage à six pans creux	2
В	0004-591-000	Vis d'assemblage à six pans creux	2
С	0004-503-000	Vis d'assemblage à tête ronde	1
D	0016-003-000	Écrou hexagonal Nylock	2
E	6060-004-043	Capuchon du montant de retenue	1
F	6060-004-044	Tube du montant	1
G	6080-090-108	Étiquette, soulever ici	2
Н	6500-101-189	Support de broche supérieur	1
J	6500-101-190	Support de broche inférieur	1
K	6500-001-302	Protection pour tube de châssis	1
L	6085-001-056	Soudure du tube du châssis externe	1
M	6085-001-057	Soudure du tube du châssis externe	1

FR 89 6516-009-007 Rev AB.0

Ensemble incubateur côte à côte Airborne en option - 6516-128-000

Rév. A (référence uniquement)

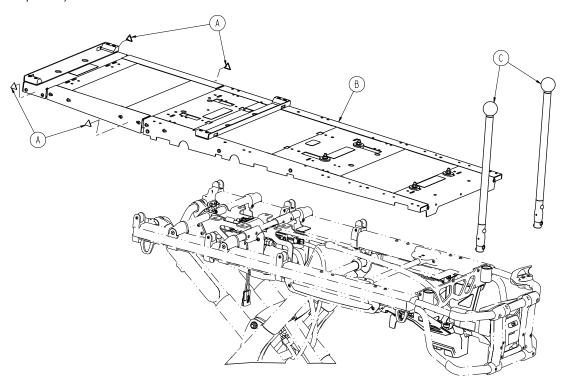


Élément	Numéro	Nom	Quantité
Α	6506-001-905	Etiquette, avertissement, écrasement des mains	4
В	6516-101-017	Adaptateur pour incubateur, côte à côte Airborne	1
С	6550-001-026	Poignée, coin, ensemble	2


6516-009-007 Rev AB.0 90 FR

Adaptateur pour incubateur, côte à côte Airborne

6516-101-017 rév. A (référence uniquement)

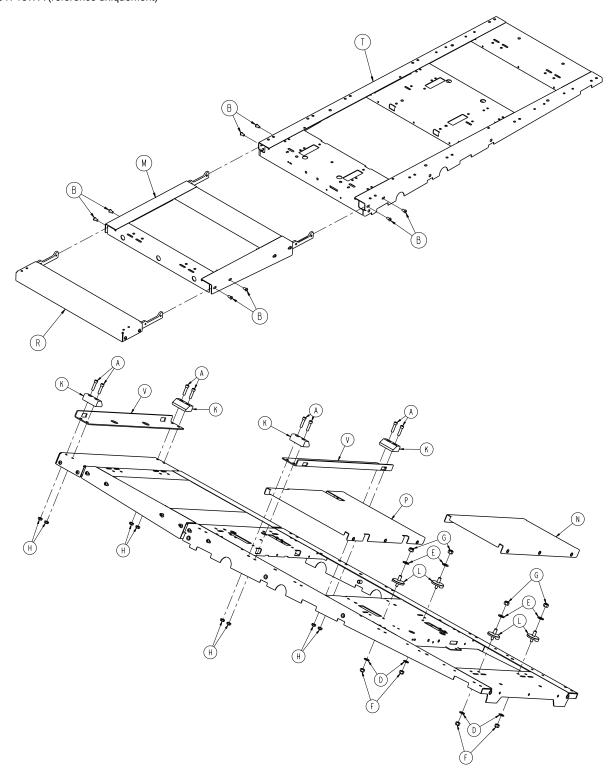

FR 91 6516-009-007 Rev AB.0

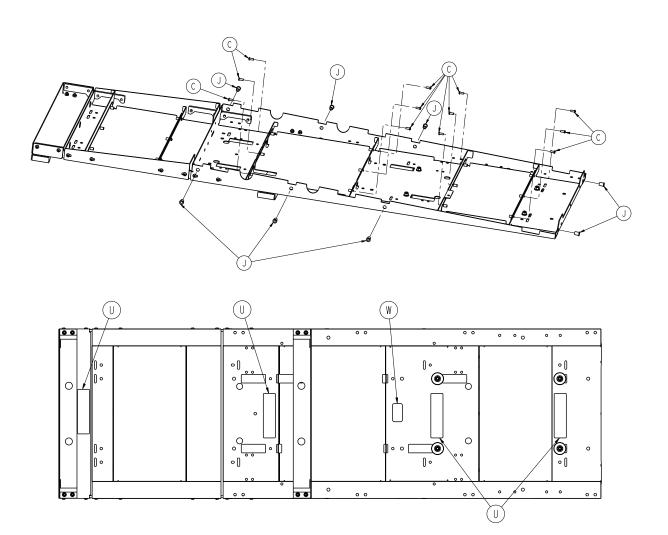


Élément	Numéro	Nom	Quantité
Α	0004-028-000	Vis d'assemblage à six pans creux	8
В	0004-589-000	Vis d'assemblage à tête ronde	8
С	0004-634-000	Vis d'assemblage à tête ronde	12
D	0011-077-000	Rondelle	4
E	0011-447-000	Rondelle	4
F	0016-028-000	Écrou hexagonal Fiberlock	4
G	0016-036-000	Écrou hexagonal Nylock	4
Н	0016-102-000	Écrou hexagonal Nylock	8
J	0055-100-076	Écrou de support	8
K	6081-200-022	Clavette, civière IT airborne	4
L	6081-201-020	Goujon de montage	4
M	6510-001-018	Ensemble d'extension	1
N	6510-001-021	Ensemble de revêtement	1
Р	6510-001-022	Ensemble de revêtement	1
R	6510-001-026	Ensemble d'extension, court	1
Т	6510-001-050	Soudure, plan de couchage, principal	1
U	6510-101-128	Étiquette, avertissement	4
V	6516-001-131	Angle de montage	2
W	6516-101-106	Étiquette, caractéristiques techniques, oxygène côte à côte Airborne	1

6516-009-007 Rev AB.0 92 FR

Ensemble extension - 6510-001-018

Rév. B (référence uniquement)

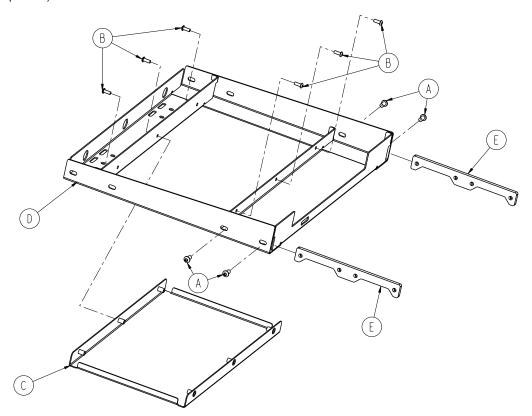


Élément	Numéro	Nom	Quantité
Α	0004-589-000	Vis d'assemblage à tête ronde	4
В	0004-634-000	Vis d'assemblage à tête ronde	6
С	6510-001-021	Ensemble de revêtement	1
D	6510-001-051	Soudure, extension de plan de couchage	1
E	6510-001-090	Barre de connexion	2

FR 93 6516-009-007 Rev AB.0

Drager® empilable en option - 6516-129-000

Rév. A (référence uniquement)

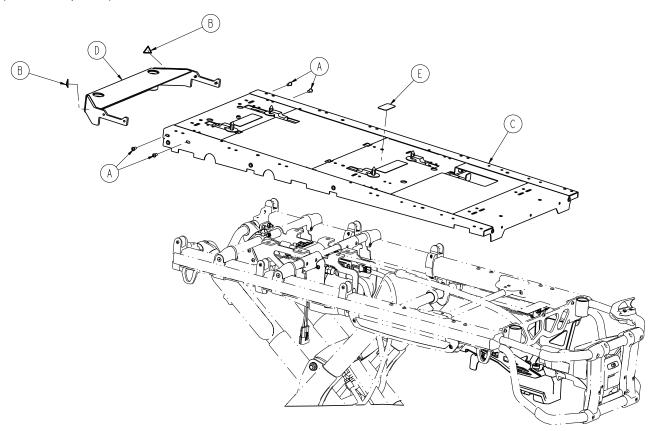


Élément	Numéro	Nom	Quantité
Α	0004-589-000	Vis d'assemblage à tête ronde	4
В	6506-001-905	Etiquette, avertissement : écrasement des mains	2
С	6510-101-019	Ensemble adaptateur pour incubateur Drager®	1
D	6510-101-053	Ensemble soudé, douille, côté tête	1
E	6516-101-107	Étiquette, caractéristiques techniques, Drager®	1

6516-009-007 Rev AB.0 94 FR

Ensemble Drager® prolongé en option - 6516-141-000

Rév. A (référence uniquement)

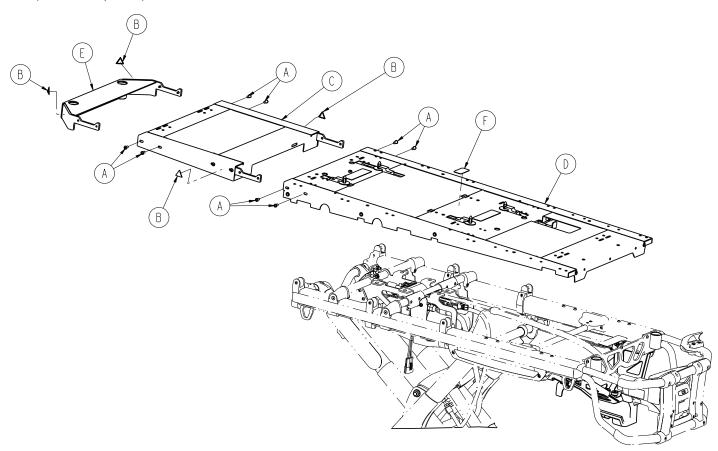


Élément	Numéro	Nom	Quantité
A	0004-589-000	Vis d'assemblage à tête ronde	8
В	6506-001-905	Etiquette, avertissement : écrasement des mains	4
С	6510-001-018	Ensemble d'extension	1
D	6510-101-019	Ensemble adaptateur pour incubateur, Drager®	1
E	6510-101-053	Ensemble soudé, douille, côté tête	1
F	6516-101-123	Étiquette, Drager® prolongé	1


FR 95 6516-009-007 Rev AB.0


Ensemble adaptateur pour incubateur - Drager®

6510-101-019 rév. A (référence uniquement)

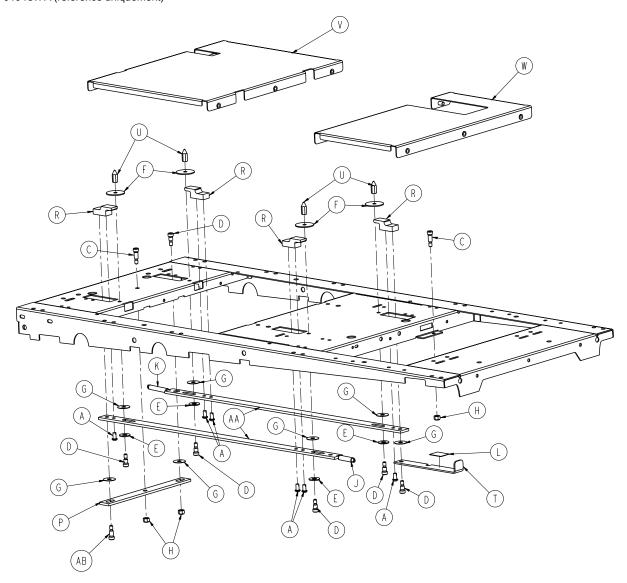

6516-009-007 Rev AB.0 96 FR

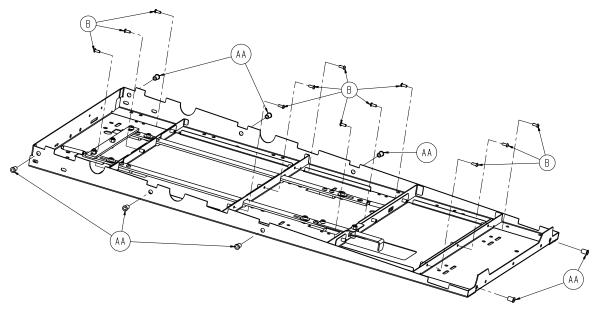

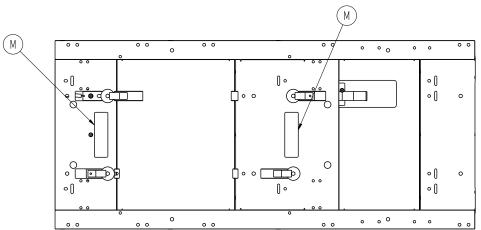

Élément	Numéro	Nom	Quantité
Α	0004-589-000	Vis d'assemblage à tête ronde	6
В	0004-634-000	Vis d'assemblage à tête ronde	12
С	0008-015-000	Vis à tête creuse	2
D	0008-051-000	Vis à tête creuse	6
E	0011-193-000	Rondelle	4
F	0011-445-000	Rondelle	4
G	0014-019-000	Rondelle	7
Н	0016-028-000	Écrou hexagonal Fiberlock	3
J	0038-453-000	Ressort d'extension	1
K	0038-576-000	Ressort d'extension	1
L	6081-090-303	Étiquette, tirette de verrouillage	1
M	6510-101-125	Étiquette, avertissement	2
N	6081-300-020	Barre coulissante	2
Р	6081-300-021	Barre d'attache - blindages Air-Shileds	1
R	6081-300-022	Lame de verrouillage	4
Ţ	6081-300-023	Poignée de traction Air-Shields	1
U	6081-300-024	Broche hexagonale (Air-Shields)	4


FR 97 6516-009-007 Rev AB.0

Élément	Numéro	Nom	Quantité
V	6510-001-022	Ensemble de revêtement	1
W	6510-001-023	Ensemble de revêtement	1
Υ	6510-001-050	Soudure, plan de couchage, principal	1
AA	0055-100-076	Écrou de support	8
AB	0008-049-000	Vis à tête creuse	1

6516-009-007 Rev AB.0 98 FR

Ensemble empilable Airborne en option - 6516-127-000

Rév. A (référence uniquement)

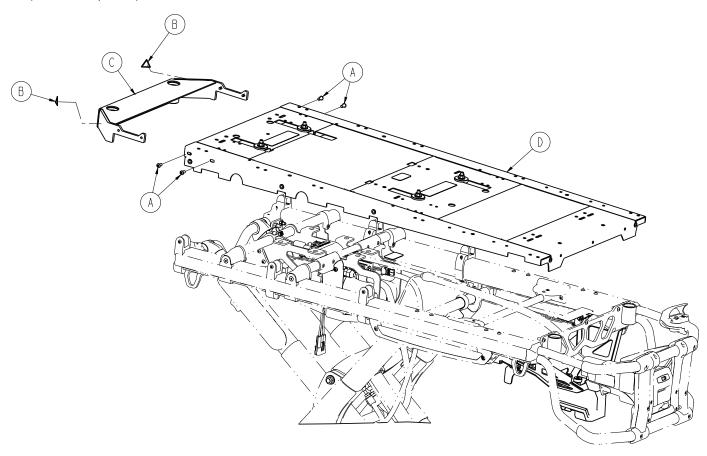


Élément	Numéro	Nom	Quantité
Α	0004-589-000	Vis d'assemblage à tête ronde	4
В	6506-001-905	Etiquette, avertissement : écrasement des mains	2
С	6510-101-053	Ensemble soudé, douille, côté tête	1
D	6516-101-020	Ensemble adaptateur d'incubateur, airborne	1

FR 99 6516-009-007 Rev AB.0

Ensemble adaptateur pour incubateur - empilable Airborne

6516-101-020 rév. A (référence uniquement)

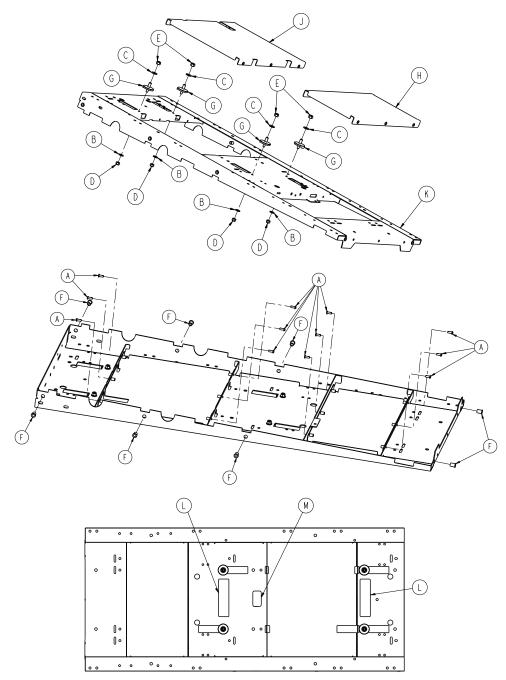

Élément	Numéro	Nom	Quantité
Α	0004-634-000	Vis d'assemblage à tête ronde	12
В	0011-077-000	Rondelle	4
С	0011-447-000	Rondelle	4
D	0016-028-000	Écrou hexagonal Fiberlock	4
E	0016-036-000	Écrou hexagonal Nylock	4
F	0055-100-076	Écrou de support	8
G	6081-201-020	Goujon de montage	4
Н	6510-001-021	Ensemble de revêtement	1


6516-009-007 Rev AB.0 100 FR

Élément	Numéro	Nom	Quantité
J	6510-001-022	Ensemble de revêtement	1
K	6510-001-050	Soudure, plan de couchage, principal	1
L	6510-101-128	Étiquette, avertissement	2
M	6516-101-105	Étiquette, caractéristiques techniques, oxygène Airborne	1

FR 101 6516-009-007 Rev AB.0

Ensemble adaptateur en option, chariot pneumatique, aucun - 6516-142-000

Rév. A (référence uniquement)

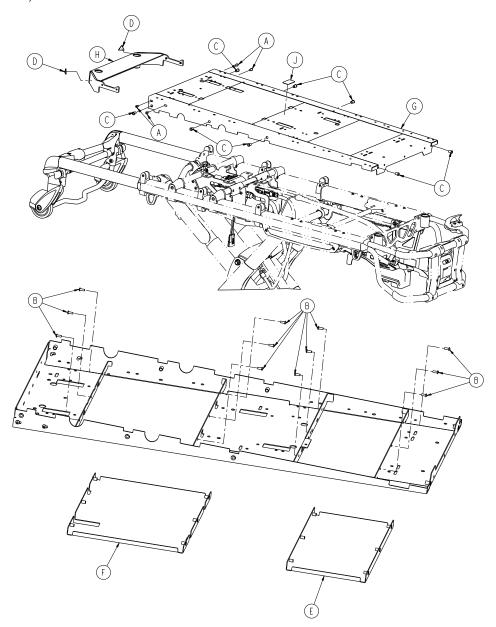


Élément	Numéro	Nom	Quantité
A	0004-589-000	Vis d'assemblage à tête ronde	4
В	0004-634-000	Vis d'assemblage à tête ronde	12
С	0055-100-076	Écrou de support	8
D	6506-001-905	Étiquette, avertissement : écrasement des mains	2
E	6510-001-021	Ensemble de revêtement	1
F	6510-001-022	Ensemble de revêtement	1
G	6510-001-050	Soudure, plan de couchage, principal	1
Н	6510-101-053	Ensemble soudé, douille, côté tête	1
J	6516-101-124	Étiquette, caractéristiques techniques, sans adaptateur en option	1

6516-009-007 Rev AB.0 102 FR

Barre de poussée en option - 6550-040-000

Rév. A (référence uniquement)

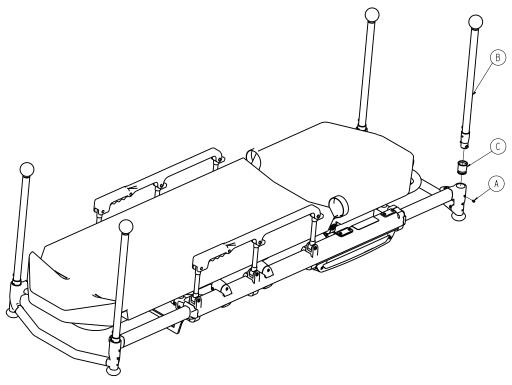


Élément	Numéro	Nom	Quantité
A	0021-179-000	Vis de blocage	4
В	6550-001-026	Ensemble poignée d'angle en option - 6550-001- 026 (page 104)	4
С	6550-001-108	Gaine pour barre de poussée	4
D	6550-001-199	Poche de rangement pour barre de poussée	1

FR 103 6516-009-007 Rev AB.0

Ensemble poignée d'angle en option - 6550-001-026

Rév. AA (référence uniquement)

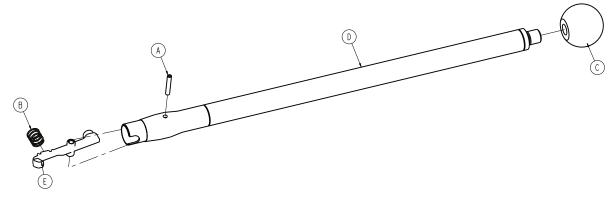


Élément	Numéro	Nom	Quantité
Α	0026-387-000	Broche à ressort fendue	1
В	0038-589-000	Ressort de compression	1
С	6510-001-119	Boule de la poignée	1
D	6550-001-067	Ensemble soudé de la poignée	1
E	655000010100	Appuyer sur le bouton de verrouillage de la barre	1

6516-009-007 Rev AB.0 104 FR

Compartiment de rangement, côté tête en option - 6500-128-000

Rév. A (référence uniquement)

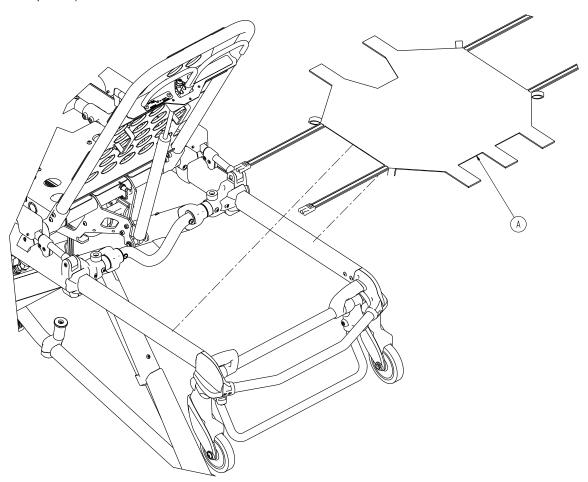


Élément	Numéro	Nom	Quantité
Α	6500-001-232	Compartiment de rangement côté tête	1

FR 105 6516-009-007 Rev AB.0

Filet de rangement du châssis en option- 6500-160-000


6500-001-126 rév. AB (référence uniquement)

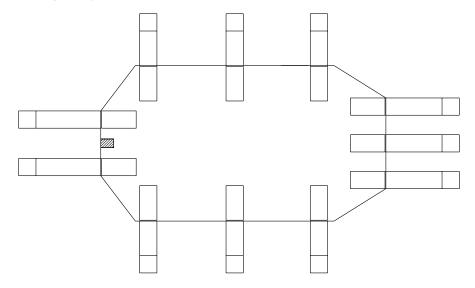

6516-009-007 Rev AB.0 106 FR

Bloc-batterie en option, SMRT - 6500-033-000

6500-101-010 Rév. AE (référence uniquement)

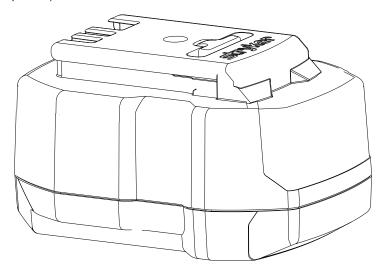


FR 107 6516-009-007 Rev AB.0

Crochet de sécurité, court - 6060-036-017/Crochet de sécurité, long - 6060-036-018/Crochet de sécurité, J - 6092-036-018

Crochet de sécurité, court - 6060-036-017 rév. A (référence uniquement)



Crochet de sécurité, long - 6060-036-018 rév. D (référence uniquement)

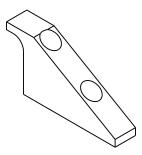

Crochet de sécurité, J - 6092-036-018 rév. A (référence uniquement)



6516-009-007 Rev AB.0 108 FR

Informations relatives à la CEM

MISE EN GARDE - Cet équipement n'est pas destiné à être utilisé dans des environnements résidentiels et peut ne pas fournir une protection adéquate à la réception radio dans de tels environnements.

Directives et déclaration du fabricant - Émissions électromagnétiques

La civière **Power-PRO** est destinée à être utilisée dans l'environnement électromagnétique spécifié ci-dessous. L'acheteur ou l'utilisateur du système **Power-PRO** doit veiller à ce qu'elle soit utilisée dans un tel environnement.

Test d'émissions	Conformité	Environnement électromagnétique
Émissions RF CISPR 11	Groupe 1	Power-PRO et le chargeur SMRT utilisent de l'énergie RF uniquement pour leurs fonctions internes. Par conséquent, ses émissions RF sont très faibles et ne peuvent vraisemblablement pas provoquer d'interférences dans les équipements électroniques situés à proximité.
Émissions RF CISPR 11	Groupe 2	Power-PRO avec l'option de compatibilité Power-LOAD doit émettre une énergie électromagnétique pour exécuter la fonction prévue. Les équipements électroniques à proximité peuvent être affectés.
Émissions RF	Power-PRO : Classe A	Power-PRO convient à une utilisation dans tous les établissements autres que les établissements résidentiels et ceux directement raccordés au réseau basse tension public alimentant les bâtiments à usage résidentiel.
CISPR 11	Chargeur SMRT (6500-201-010) : Classe B	Le chargeur SMRT convient à une utilisation dans tous les établissements autres que les établissements résidentiels et ceux directement raccordés au réseau basse tension public alimentant les bâtiments à usage résidentiel.
Émissions harmoniques CEI 61000-3-2	Power-PRO : S.O. Chargeur SMRT (6500-201-010) : Classe A	Le chargeur SMRT convient à une utilisation dans tous les établissements autres que les établissements résidentiels et ceux directement raccordés au réseau basse tension public alimentant les bâtiments à usage résidentiel.
Fluctuations de tension Émissions de papillotement CEI 61000-3-3	Power-PRO : S.O. Chargeur SMRT (6500-201-010) : conforme	Le chargeur SMRT convient à une utilisation dans tous les établissements autres que les établissements résidentiels et ceux directement raccordés au réseau basse tension public alimentant les bâtiments à usage résidentiel.

Distances de séparation recommandées entre les équipements de communication RF portables et mobiles et Power-PRO

Power-PRO est destiné à être utilisé dans un environnement électromagnétique où les perturbations des RF rayonnées sont contrôlées. L'acheteur ou l'utilisateur de Power-PRO peut contribuer à prévenir les interférences électromagnétiques en respectant la distance minimum entre les équipements de communication RF portables et mobiles (émetteurs) et Power-PRO, comme recommandé ci-dessous, en fonction de la puissance de sortie maximale des équipements de communication.

Puissance de sortie maximale nominale de l'émetteur	Distance de séparation en fonction de la fréquence de l'émetteur					
W	150 kHz à 80 MHz D=(1,2) (√ <i>P</i>)	80 MHz à 800 MHz D=(0,18) (√ <i>P</i>)	800 MHz à 2,5 GHz D=(0,35) (√ <i>P</i>)			
0,01	0,12	0,018	0,035			
0,1	0,38	0,57	0,11			
1	1,2	0,18	0,35			
10	3,8	0,57	1,1			

FR 109 6516-009-007 Rev AB.0

Distances de séparation recommandées entre les équipements de communication RF portables et mobiles et Power-PRO					
100	12	1,8	3,5		

Pour les émetteurs dont la puissance de sortie maximum nominale n'est pas indiquée ci-dessus, la distance de séparation recommandée d en mètres (m) peut être déterminée en utilisant l'équation applicable à la fréquence de l'émetteur, où P est la puissance de sortie maximum nominale en watts (W), selon le fabricant de l'émetteur. Remarque 1 : À 80 MHz et 800 MHz, la distance de séparation pour la gamme de fréquences la plus élevée s'applique. Remarque 2 : Ces directives peuvent ne pas convenir à toutes les situations. La propagation électromagnétique est affectée par l'absorption et la réflexion des structures, des objets et des personnes.

Directives et déclaration du fabricant - Immunité électromagnétique

Power-PRO est destiné à être utilisé dans l'environnement électromagnétique spécifié ci-dessous. L'acheteur ou l'utilisateur du système Power-PRO doit s'assurer qu'il est utilisé dans un tel environnement.

doit s'assurer qu'il est utilisé dans un	1	1	F
Test d'immunité	Niveau d'essai CEI 60601	Niveau de conformité	Environnement électromagnétique – Directives
Décharge électrostatique (DES) CEI 61000-4-2	<u>+</u> 6 kV contact <u>+</u> 8 kV air	<u>+</u> 6 kV contact <u>+</u> 8 kV air	Les sols doivent être en bois, en béton ou en carrelage céramique. Si les sols sont recouverts d'un matériau synthétique, l'humidité relative doit être d'au moins 30 %. Applicable à : • Power-PRO • Chargeur SMRT (6500-201-010)
Transitoires électriques rapides/ rafale CEI 61000-4-4	±2 kV pour les lignes électriques ±1 kV pour les lignes entrée/sortie	±2 kV pour les lignes électriques ±1 kV pour les lignes entrée/sortie	La qualité de l'alimentation électrique doit être celle d'un environnement commercial ou hospitalier typique. Applicable à : Chargeur SMRT (6500-201-010)
Surtension CEI 61000-4-5	±8 kV ligne(s) à ligne(s) ±2 kV ligne(s) à la terre	±8 kV ligne(s) à ligne(s) ±2 kV ligne(s) à la terre	La qualité de l'alimentation électrique doit être celle d'un environnement commercial ou hospitalier typique. Applicable à : Chargeur SMRT (6500-201-010)
Baisses de tension, variations de tension et coupures brèves sur les lignes d'alimentation d'entrée CEI 61000-4-11	<5 % U _T (baisse de 95 % en U _T) pendant 0,5 cycle 40 % U _T (baisse de 60 % en U _T) pendant 5 cycles 70 % U _T (baisse de 30 % en U _T) pendant 25 cycles 0 % U _T pendant 250 cycles <5 % U _T (>baisse de 95 % en U _T) pendant 5 secondes	<5 % U _T (baisse de 95 % en U _T) pendant 0,5 cycle 40 % U _T (baisse de 60 % en U _T) pendant 5 cycles 70 % U _T (baisse de 30 % en U _T) pendant 25 cycles 0 % U _T pendant 250 cycles <5 % U _T (>baisse de 95 % en U _T) pendant 5 secondes	La qualité de l'alimentation électrique doit être celle d'un environnement commercial ou hospitalier typique. Si l'utilisateur du chargeur SMRT a besoin que le fonctionnement soit maintenu pendant les interruptions du secteur, il est recommandé d'alimenter le système à l'aide d'un onduleur ou d'une batterie.
Champ magnétique à la fréquence du secteur (50/60 Hz) CEI 61000-4-8	3 A/m	3 A/m	Les niveaux des champs magnétiques à la fréquence du réseau doivent correspondre aux niveaux caractéristiques d'un emplacement type dans un environnement commercial ou hospitalier typique. Applicable à : • Power-PRO • Chargeur SMRT (6500-201-010)

6516-009-007 Rev AB.0 110 FR

Directives et déclaration du fabricant - Immunité électromagnétique

Remarque : U _T représente la tension	n alternative du secteur avant l'applicatio	on du niveau d'essai.	
RF conduites CEI 61000-4-6	3 Veff 150 kHz à 80 MHz	3 V	Les équipements de communication RF portables et mobiles ne doivent pas être utilisés plus près des composants du Power-PRO ou du chargeur SMRT, y compris les câbles, que la distance de séparation recommandée calculée avec l'équation applicable à la fréquence de l'émetteur. Distance de séparation recommandée
RF rayonnées	20 V/m		D=(1,2) (√ <i>P</i>)
CEI 61000-4-3	80 MHz à 2,5 GHz	20 V/m	D=(0,18) (√ <i>P</i>)
			80 MHz à 800 MHz
			D=(0,35) (√ <i>P</i>)
			800 MHz à 2,5 GHz
			où <i>P</i> correspond à la puissance nominale de sortie maximum en watts (W) pour l'émetteur, selon le fabricant de ce dernier, et <i>d</i> correspond à la distance de séparation recommandée en mètres (m).
			Les intensités de champ produites par les émetteurs RF fixes, telles que déterminées par un site électromagnétique ^a , doivent être inférieures au niveau de conformité de chaque gamme de fréquences ^b .
			Des interférences peuvent survenir à proximité des équipements porteurs du symbole suivant :

Remarque 1 : À 80 MHz et à 800 MHz, la gamme de fréquences la plus élevée s'applique.

Remarque 2 : Ces directives peuvent ne pas convenir à toutes les situations. La propagation électromagnétique est affectée par l'absorption et la réflexion des structures, des objets et des personnes.

FR 111 6516-009-007 Rev AB.0

^a Les intensités de champ des émetteurs fixes, telles que les stations de base pour les radiotéléphones (cellulaires/sans fil) et les radios mobiles terrestres, la radio d'amateur, la radiodiffusion AM et FM, et la diffusion télévisuelle, ne peuvent pas être prévues théoriquement avec exactitude. Pour évaluer l'environnement électromagnétique dû aux émetteurs RF fixes, il convient d'envisager un relevé des champs électromagnétiques du site. Si l'intensité de champ mesurée à l'emplacement où **Power-PRO** est utilisé dépasse le niveau de conformité RF applicable indiqué ci-dessus, il convient d'observer le système **Power-PRO** pour vérifier qu'il fonctionne normalement. Si des performances anormales sont observées, des mesures supplémentaires peuvent s'avérer nécessaires, telles que la réorientation ou le déplacement de **Power-PRO**.


b Dans la gamme de fréquences de 150 kHz à 80 MHz, les intensités de champ sont inférieures à 20 V/m.

Passeport de recyclage

650600010016

Rév. AA



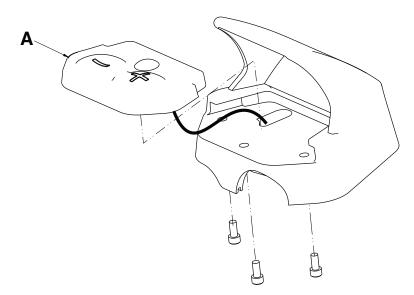


Élément	Référence de pièce recyclable	Description	Informations importantes	Quantité
А	650600010130	Interrupteur	Aucune substance extrêmement préoccupante présente	2

6516-009-007 Rev AB.0 112 FR

FR




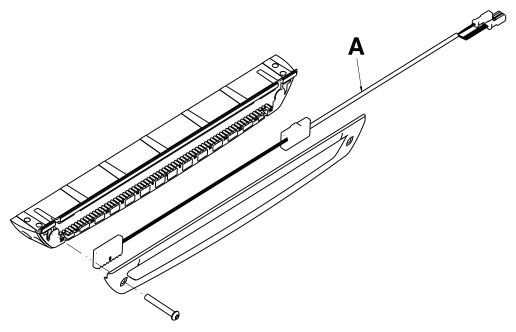

Élément	Référence de pièce recyclable	Description	Informations importantes	Quantité
А	6500-001-160	Capteur à effet Hall	Aucune substance extrêmement préoccupante présente	1

113 6516-009-007 Rev AB.0




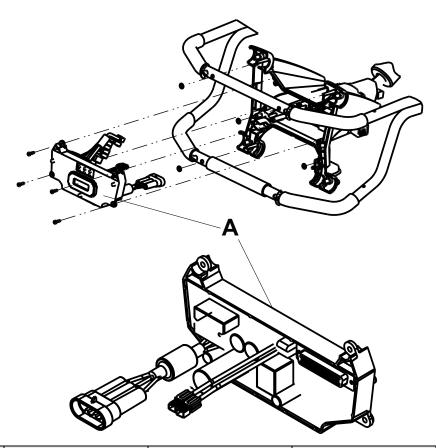

Élément	Référence de pièce recyclable	Description	Informations importantes	Quantité
Α	6500-102-014	Ensemble de carte de commande	Contient un écran à cristaux liquides	1

6516-009-007 Rev AB.0 114 FR



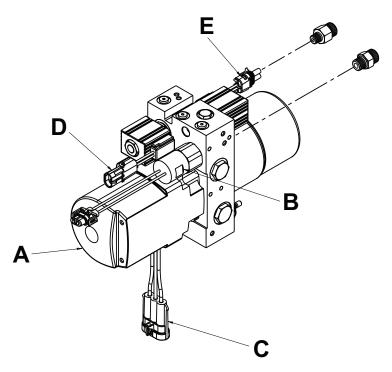


Élément	Référence de pièce recyclable	Description	Informations importantes	Quantité
Α	417238	Moteur, 24 VCC	Contient un liquide de transmission automatique*	
В	6500-001-290	Manette de pression		
С	12124686	Connecteur de moteur	Aucune substance extrêmement préoccupante présente	1
D	12010973	Connecteur de la vanne A		
Е	12015792	Connecteur de la vanne B		

^{*}Mobil Mercon V, mélange synthétique ou équivalent

FR 115 6516-009-007 Rev AB.0




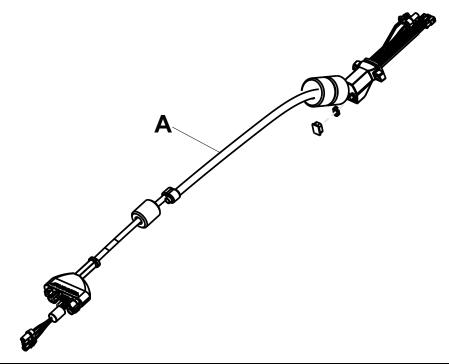

Élément	Référence de pièce recyclable	Description	Informations importantes	Quantité
Α	6500-002-159	Ensemble de câbles	Aucune substance extrêmement préoccupante présente	1

6516-009-007 Rev AB.0 116 FR




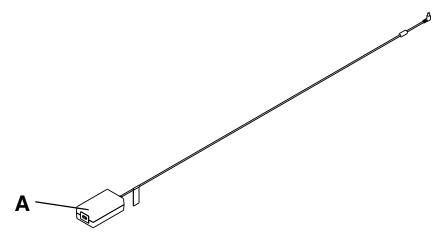

Élément	Référence de pièce recyclable	Description	Informations importantes	Quantité
А	6500-201-248	Alimentation de chargeur	Aucune substance extrêmement préoccupante présente	1

FR 117 6516-009-007 Rev AB.0




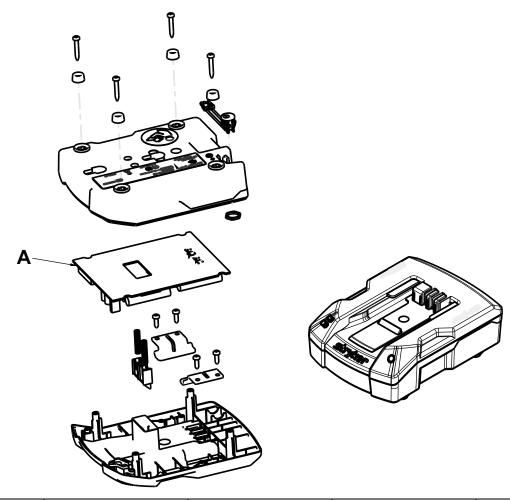

Élément	Référence de pièce recyclable	Description	Informations importantes	Quantité
А	6500-201-140	Assemblage de carte de circuit imprimé pour chargeur	Aucune substance extrêmement préoccupante présente	1

6516-009-007 Rev AB.0 118 FR



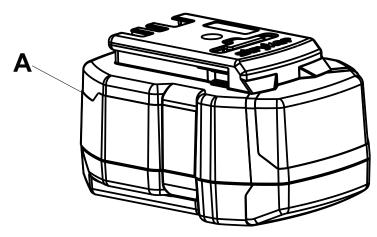

Élément	Référence de pièce recyclable	Description	Informations importantes	Quantité
А	6500-101-010	Accumulateur Ni-CAD	Cadmium, hydroxyde de cadmium	2



La « Rechargeable Battery Recycling Corporation » (RBRC) est un organisme public à but non lucratif qui encourage le recyclage des batteries rechargeables portables. Les batteries usagées doivent être déposées dans un site de collecte de batteries. Visiter le site Web de la RBRC (www.rbrc.org) pour trouver un site de collecte à proximité ou composer le numéro de téléphone indiqué sur le symbole de recyclage.

FR 119 6516-009-007 Rev AB.0



Stryker Corporation or its divisions or other corporate affiliated entities own, use or have applied for the following trademarks or service marks: **Performance-LOAD**, **Power-LOAD**, **Power-PRO**, **SMRT Power System**, **Stryker**. All other trademarks are trademarks of their respective owners or holders.



Stryker Medical 3800 E. Centre Avenue Portage, MI 49002 USA

Copyright © 2025 Stryker

WCR: AB.4

2025-09

6516-009-007 Rev AB.0