

Fixation de civière d'ambulance

Manuel d'entretien

REF	6370
REF	6371
REF	6377
REF	6378
REF	6391
REF	6393



Table des matières

Définition de « Avertissement », « Mise en garde » et « Remarque »	2
Introduction à l'entretien	3
Durée de vie utile prévue	3
Informations de contact	3
Emplacement du numéro de série	3
Entretien préventif	4
Fiche d'entretien	4
Documentation sur la formation	5
Ensemble de fixation de civière montée sur plancher - 6370-000-000	6
Ensemble de fixation de civière à montage mural - 6371-000-000	7
Ensemble de fixation de civière montée sur plancher - 6377-000-000	8
Fixation de civière, montage sur plancher MTS - 637700550010	9
Ensemble de fixation de civière à montage sur plancher de longueur réduite - 6378-000-000	10
Fixation à montage mural Power-LOAD pour victimes en masse - 6391-000-000	11
Fixation montée sur plancher mural Power-LOAD pour victimes en masse - 6391-000-000	12
Option de crochet à ramure Performance-LOAD - 6393-001-001	13
Performance-LOAD sans crochet à ramure en option - 6393-001-002	14
Fixation à montage mural Performance-LOAD pour victimes en masse - 6393-000-000	15
Ensemble Performance-LOAD monté sur plancher pour victimes en masse - 6393-000-000	16
Ensemble de rail - 6360-020-000/Ensemble de rail, court - 6362-020-000/Ensemble de rail, long - 6362-021-010	17

Définition de « Avertissement », « Mise en garde » et « Remarque »

Les termes **AVERTISSEMENT**, **MISE EN GARDE** et **REMARQUE** ont une signification particulière et doivent faire l'objet d'une lecture attentive.

AVERTISSEMENT

Avertit le lecteur d'une situation qui, si elle n'est pas évitée, pourrait entraîner la mort ou des blessures graves. Peut également attirer l'attention sur l'existence potentielle d'effets indésirables graves ou de risques d'accident.

MISE EN GARDE

Avertit le lecteur d'une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, peut causer des blessures mineures ou modérées à l'utilisateur ou au patient ou endommager le matériel en question ou d'autres biens. Couvre notamment les précautions à prendre afin d'assurer l'utilisation sûre et efficace du dispositif et d'éviter les dommages qui pourraient découler de l'usage ou du mésusage du matériel.

Remarque - Fournit des informations spécifiques destinées à faciliter l'entretien ou à clarifier des instructions importantes.

Introduction à l'entretien

Ce manuel vous aide à entretenir le produit Stryker concerné. Lire ce manuel pour entretenir ce produit. Ce manuel ne traite pas du fonctionnement de ce produit. Consulter le manuel d'utilisation pour les instructions d'utilisation. Pour consulter le manuel d'utilisation ou le manuel d'entretien en ligne, aller sur le site <https://techweb.stryker.com/>.

Durée de vie utile prévue

Les fixations de civière ont une durée de vie utile prévue de sept ans dans des conditions normales d'utilisation et avec un entretien périodique approprié.

Informations de contact

Contactez le service clientèle ou le support technique de Stryker au : 1-800-327-0770.

Stryker Medical
3800 E. Centre Avenue
Portage, MI 49002
États-Unis

Pour consulter votre mode d'emploi ou votre manuel d'entretien en ligne, rendez-vous sur <https://techweb.stryker.com/>.

Avoir le numéro de série (A) du produit Stryker à disposition avant d'appeler le service clientèle ou le support technique de Stryker. Inclure le numéro de série dans toutes les communications écrites.

Emplacement du numéro de série


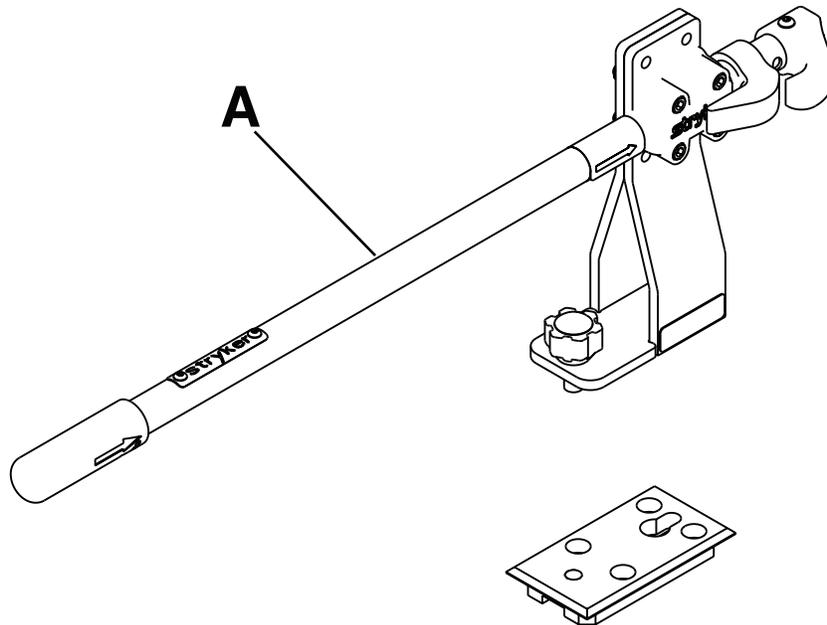


Figure 1 – Emplacement du numéro de série

Ensemble de fixation de civière montée sur plancher - 6370-000-000


6370-230-010 rév. F (référence uniquement)

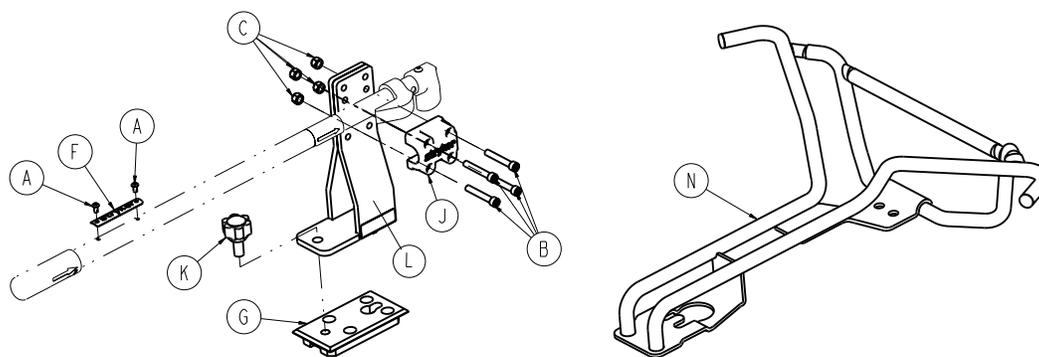

Élément	Numéro	Nom	Quantité
A	0004-587-000	Vis d'assemblage à tête ronde	2
B	0004-250-000	Vis d'assemblage à six pans creux	4
C	0016-036-000	Écrou hexagonal Nylock	4
F	6370-001-926	Étiquette avec numéro de série	1
G	6360-030-011	Grande plaque de plancher	1
J	6360-130-018	Pince du rail	1
K	6360-030-031	Ensemble de molette à tête ronde	1
L	6360-030-024	Ensemble de support de rail	1
N	6370-230-038	Ensemble de crochet à ramure	1

Ensemble de fixation de civière à montage mural - 6371-000-000


6371-230-010 rév. F (référence uniquement)

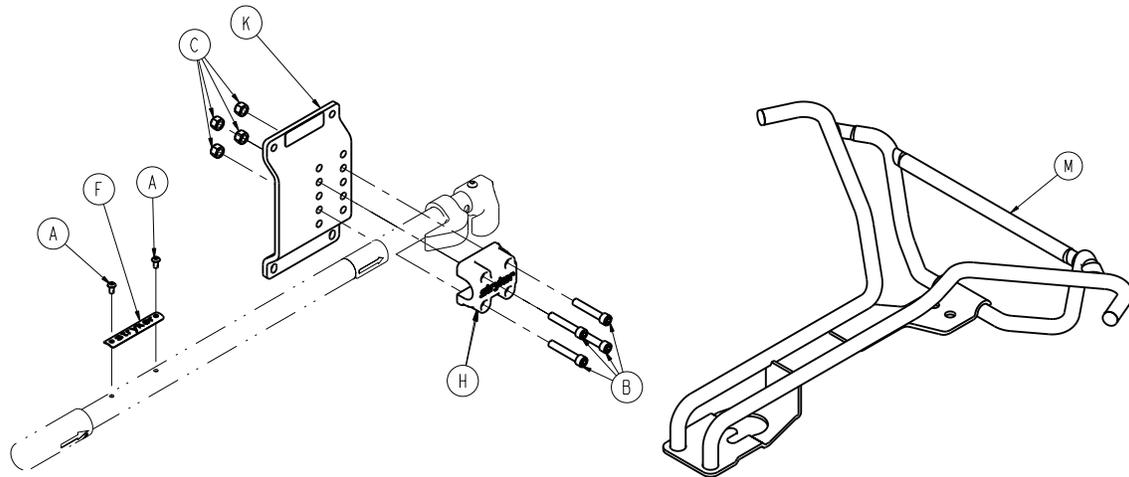

Élément	Numéro	Nom	Quantité
A	0004-587-000	Vis d'assemblage à tête ronde	2
B	0004-579-000	Vis d'assemblage à six pans creux	4
C	0016-036-000	Écrou hexagonal Nylock	4
F	6371-001-926	Étiquette avec numéro de série	1
H	6360-130-018	Pince du rail	1
K	6361-030-012	Ensemble de support de montage mural	1
M	6370-230-038	Ensemble de crochet à ramure	1

Ensemble de fixation de civière montée sur plancher - 6377-000-000


6377-230-010 rév. AA (référence uniquement)

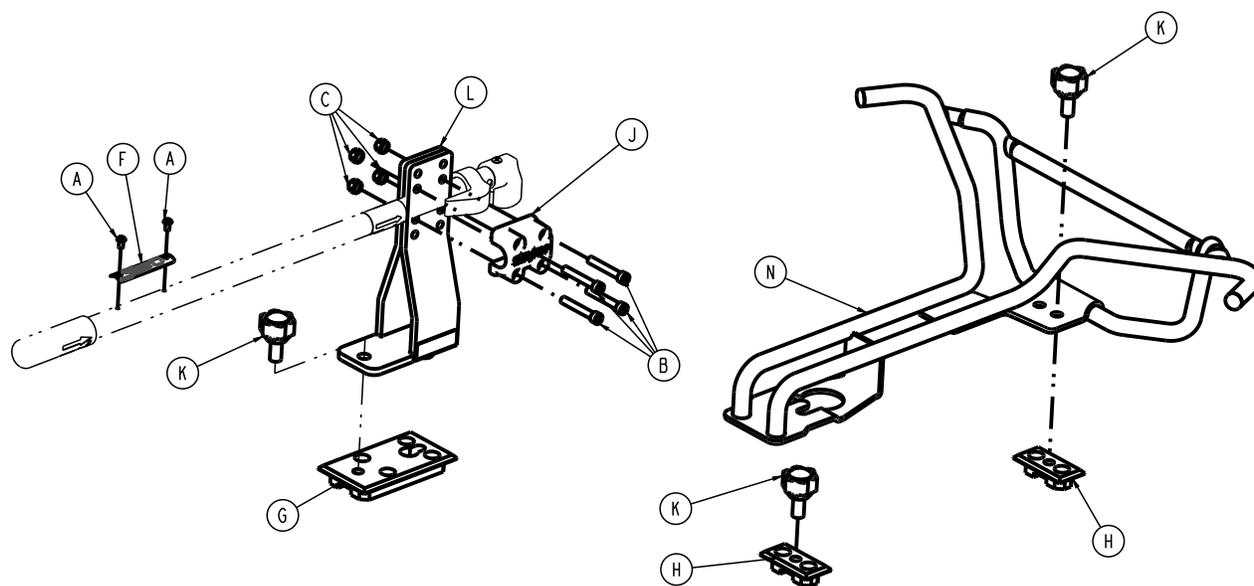

Élément	Numéro	Nom	Quantité
A	0004-587-000	Vis d'assemblage à tête ronde	2
B	0004-250-000	Vis d'assemblage à six pans creux	4
C	0016-036-000	Écrou hexagonal Nylock	4
F	6377-001-926	Étiquette avec numéro de série	1
G	6360-030-011	Grande plaque de plancher	2
H	6360-030-012	Petite plaque de plancher	4
J	6360-130-018	Pince du rail	1
K	6360-030-031	Ensemble de molette à tête ronde	3
L	6360-030-024	Ensemble de support de rail	1
N	6370-230-038	Ensemble de crochet à ramure	1

Fixation de civière, montage sur plancher MTS - 637700550010


Rév. A (référence uniquement)

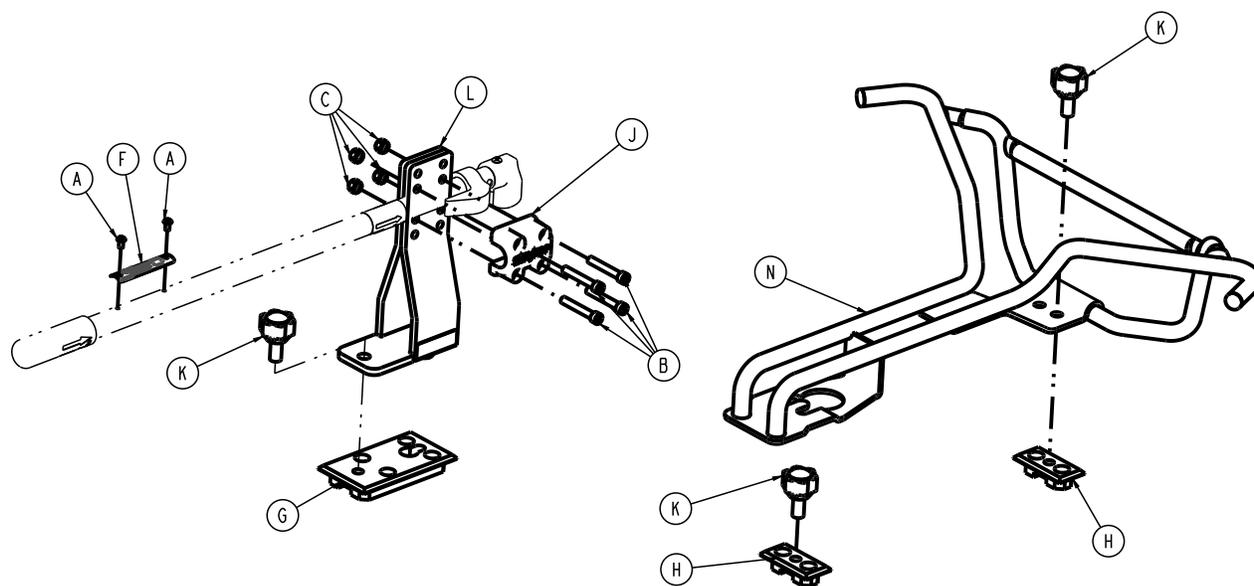

Élément	Numéro	Nom	Quantité
A	0004-587-000	Vis d'assemblage à tête ronde	2
B	0004-250-000	Vis d'assemblage à six pans creux	4
C	0016-036-000	Écrou hexagonal Nylock	4
F	637700010927	Étiquette avec numéro de série du MTS 6377	1
G	6360-030-011	Grande plaque de plancher	2
H	6360-030-012	Petite plaque de plancher	4
J	6360-130-018	Pince du rail	1
K	6360-030-031	Ensemble de molette à tête ronde	3
L	6360-030-024	Ensemble de support de rail	1
N	6370-230-038	Ensemble de crochet à ramure	1

Ensemble de fixation de civière à montage sur plancher de longueur réduite - 6378-000-000


6378-130-010 rév. AA (référence uniquement)

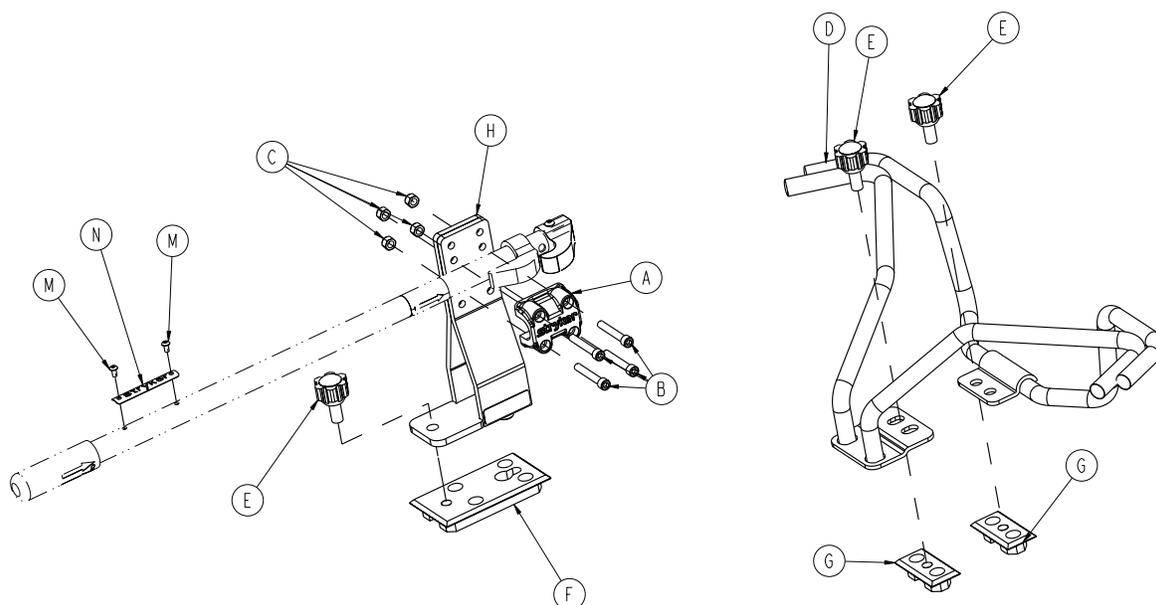

Élément	Numéro	Nom	Quantité
A	6360-130-018	Pince du rail	1
B	0004-250-000	Vis d'assemblage à six pans creux	4
C	0016-036-000	Écrou hexagonal Nylock	4
D	6378-030-038	Ensemble de crochet à ramure	1
E	6360-030-031	Ensemble de molette à tête ronde	3
F	6360-030-011	Grande plaque de plancher	2
G	6360-030-012	Petite plaque de plancher	4
H	6360-030-024	Ensemble de support de rail	1
M	0004-587-000	Vis d'assemblage à tête ronde	2
N	6378-001-926	Étiquette avec numéro de série	1

Fixation à montage mural Power-LOAD pour victimes en masse - 6391-000-000


6391-001-001 rév. B (référence uniquement)

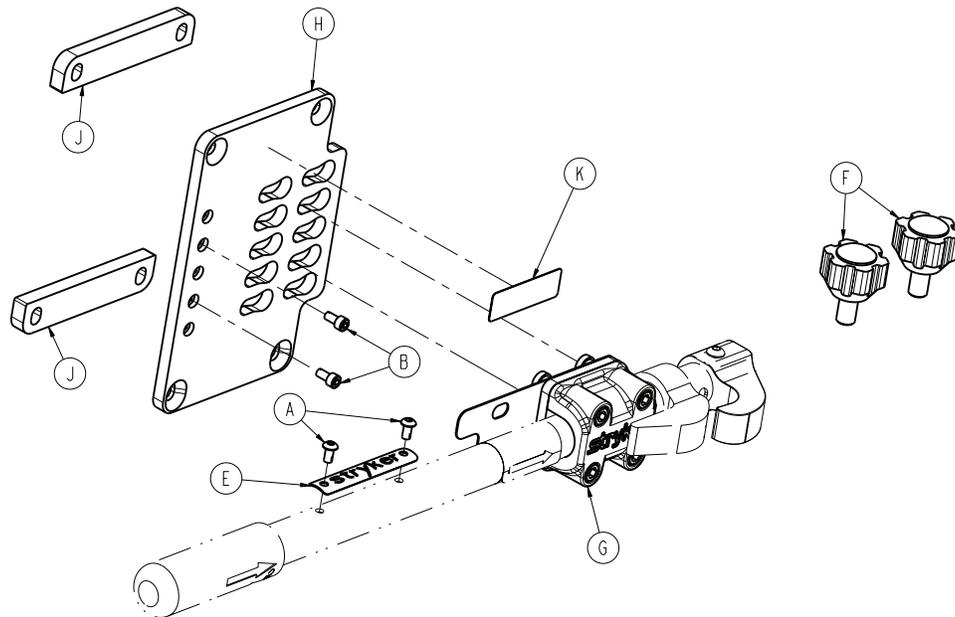

Élément	Numéro	Nom	Quantité
A	0004-587-000	Vis d'assemblage à tête ronde	2
B	0004-658-000	Vis d'assemblage à six pans creux	2
E	6391-001-926	Étiquette avec numéro de série	1
F	6390-001-033	Ensemble de molette	2
G	6390-001-034	Ensemble de support de montage mural	1
H	6390-001-155	Support de montage mural, détachable	1
J	6390-001-156	Espaceur de support de montage mural	2
K	6391-090-001	Étiquette, système de fixation de civière	1

Fixation montée sur plancher mural Power-LOAD pour victimes en masse - 6391-000-000


6391-001-002 rév. AA (référence uniquement)

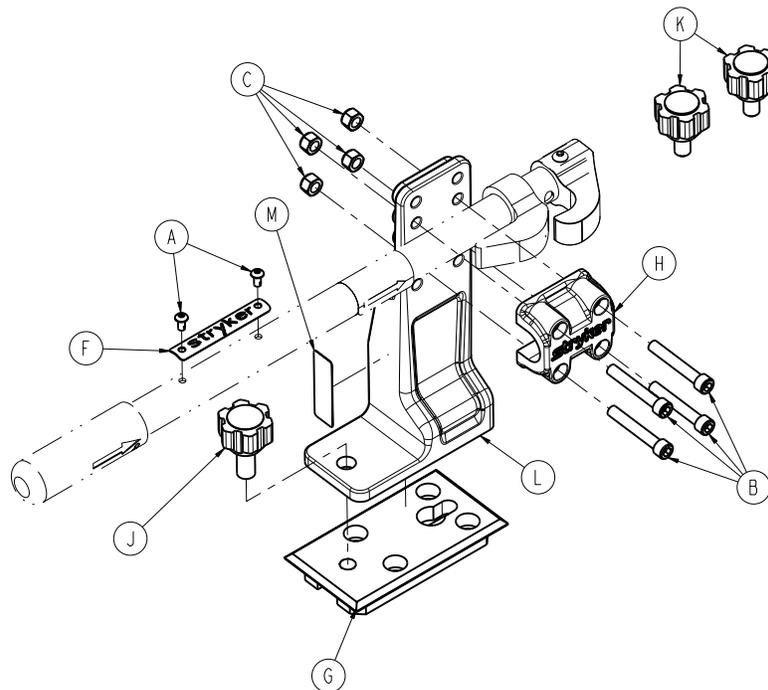

Élément	Numéro	Nom	Quantité
A	0004-587-000	Vis d'assemblage à tête ronde	2
B	0004-250-000	Vis d'assemblage à six pans creux	4
C	0016-036-000	Écrou hexagonal Nylock	4
F	6391-001-926	Étiquette avec numéro de série	1
G	6360-030-011	Plaque de plancher, grande	1
H	6360-130-018	Pince du rail	1
J	6360-030-031	Ensemble de molette à tête ronde	1
K	6390-001-033	Ensemble de molette	2
L	639000010142	Support de montage sur plancher de la pince de rail	1
M	6391-090-001	Étiquette, système de fixation de civière	1

Option de crochet à ramure Performance-LOAD - 6393-001-001


Rév. A (référence uniquement)

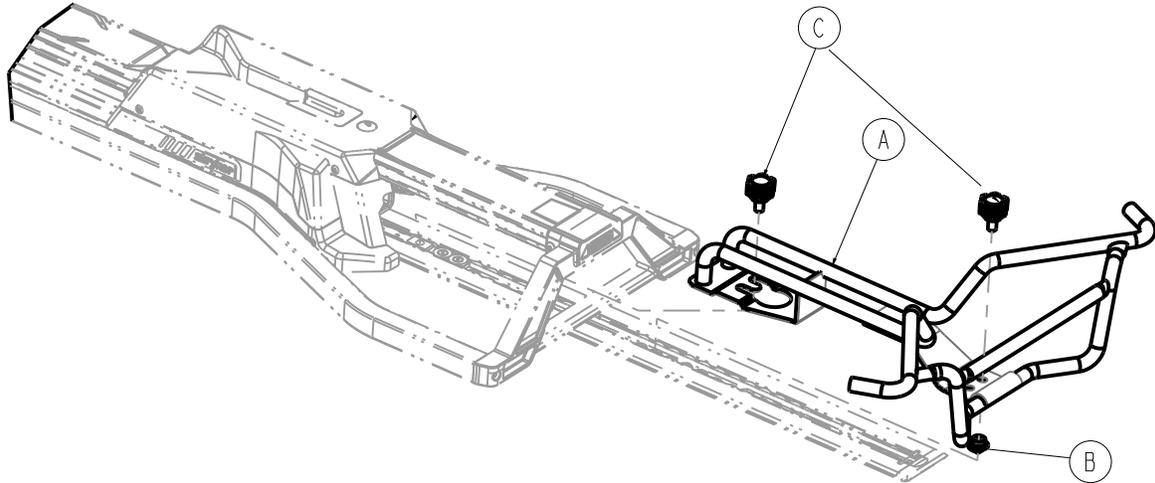

Élément	Numéro	Nom	Quantité
A	6370-230-038	Ensemble de crochet à ramure	1
B	6392-001-151	Came pour victimes en masse	1
C	6390-001-033	Ensemble de molette	2

Performance-LOAD sans crochet à ramure en option - 6393-001-002


Rév. C (référence uniquement)

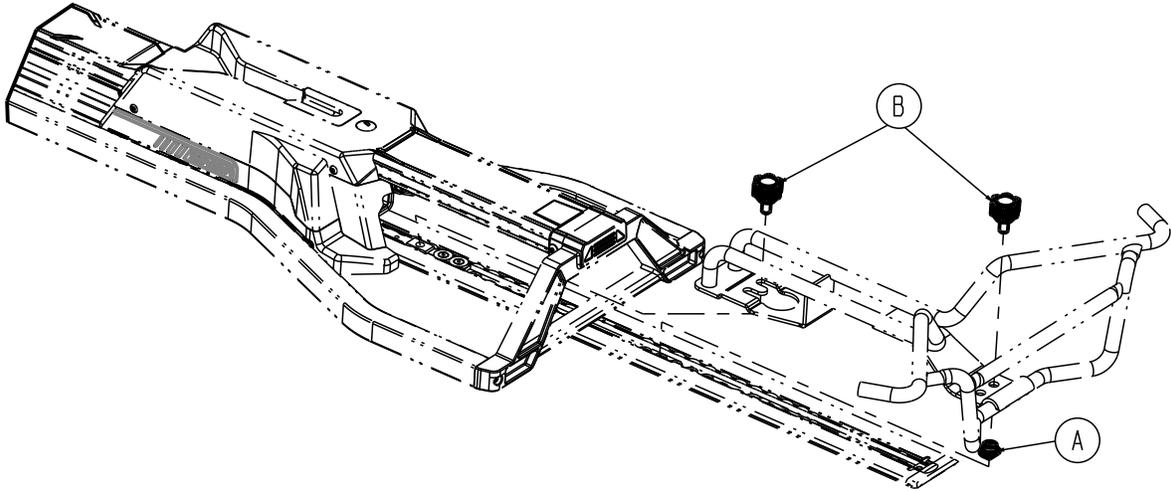

Élément	Numéro	Nom	Quantité
A	6392-001-151	Came pour victimes en masse	1
B	6390-001-033	Ensemble de molette	2

Fixation à montage mural Performance-LOAD pour victimes en masse - 6393-000-000


6393-002-001 rév. AA (référence uniquement)

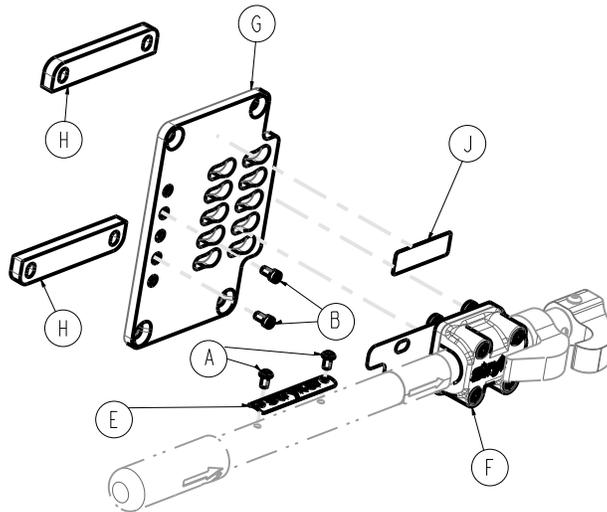

Élément	Numéro	Nom	Quantité
A	0004-587-000	Vis d'assemblage à tête ronde	2
B	0004-658-000	Vis d'assemblage à six pans creux	2
E	6393-001-926	Étiquette avec numéro de série	1
F	6390-001-034	Ensemble de support de montage mural	1
G	6390-001-155	Support de montage mural, détachable	1
H	6390-001-156	Espaceur de support de montage mural	2
J	6393-090-001	Étiquette, système de fixation de civière	1

Ensemble Performance-LOAD monté sur plancher pour victimes en masse - 6393-000-000


6393-002-002 rév. AB (référence uniquement)

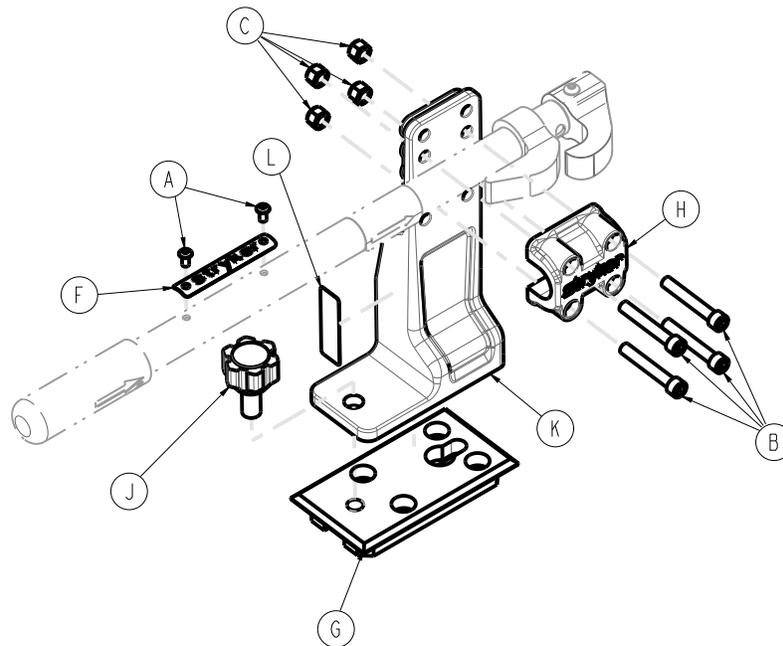


Élément	Numéro	Nom	Quantité
A	0004-587-000	Vis d'assemblage à tête ronde	2
B	0004-250-000	Vis d'assemblage à six pans creux	4
C	0016-036-000	Écrou hexagonal Nylock	4
F	6393-001-926	Étiquette avec numéro de série	1
G	6360-030-011	Plaque de plancher, grande	1
H	6360-130-018	Pince du rail	1
J	6360-030-031	Ensemble de molette à tête ronde	1
K	639000010142	Support de montage sur plancher, pince de rail	1
L	6393-090-001	Étiquette, système de fixation de civière	1

Ensemble de rail - 6360-020-000/Ensemble de rail, court - 6362-020-000/Ensemble de rail, long - 6362-021-010


6360-020-010 rév. H (référence uniquement)

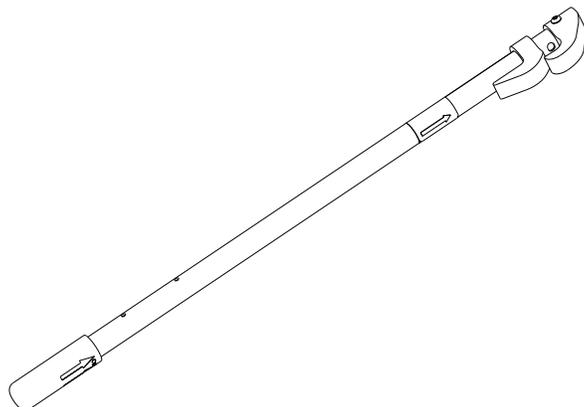

6362-020-010 rév. B (référence uniquement)

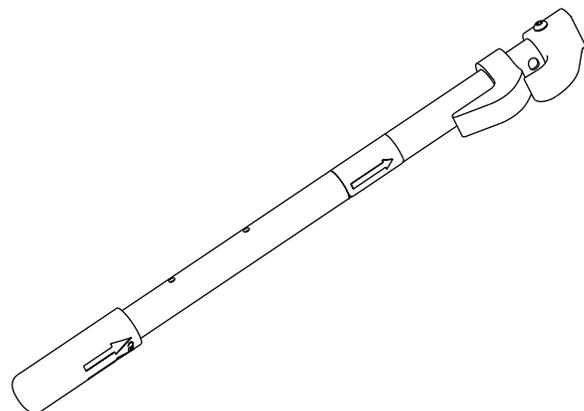

6362-021-010 Rév. B (référence uniquement)

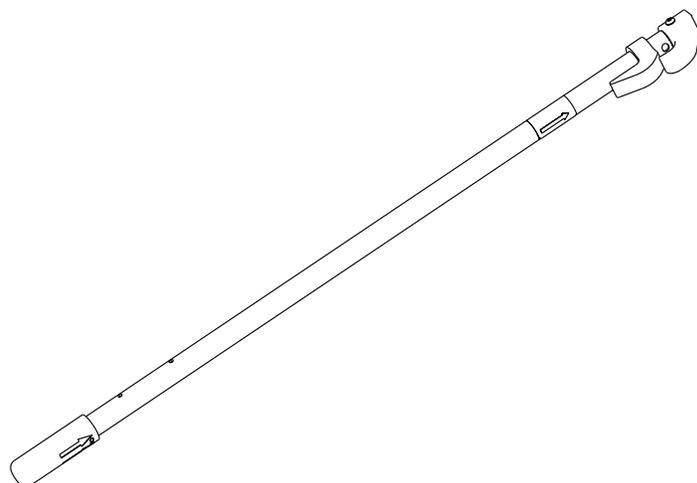



Stryker Corporation or its divisions or other corporate affiliated entities own, use or have applied for the following trademarks or service marks: **Performance-LOAD**, **Power-LOAD**, **Stryker**. All other trademarks are trademarks of their respective owners or holders.



Stryker Medical
3800 E. Centre Avenue
Portage, MI 49002
USA