

Michael Graves with Stryker
Patient Chairs and Ottoman
Michael Graves en collaboration avec Stryker
Pour les fauteuils de patient et repose-pieds

REF	4850	REF	4853	REF	4856
REF	4851	REF	4854	REF	4857
REF	4852	REF	4855		

stryker®

Operations/Maintenance Manual

Manuel d'utilisation et d'entretien



Table of Contents

Symbols and Definitions	1-2
Symbols	1-2
Warning/Caution/Note Definition	1-2
Introduction	1-3
Intended Use	1-3
Product Description	1-3
Specifications	1-4
Contact Information	1-5
Serial Number Location	1-5
Product Illustration	1-6
Summary of Safety Precautions	1-7
Operation Guide	1-9
Stowing the Ottoman	1-9
Preventative Maintenance	1-10
Checklist	1-10
Cleaning	1-11
Fabric Cleaning and Maintenance	1-11
Frame and Arm Cleaning	1-14
Quick Reference Replacement Parts List	1-15
Service Information	1-16
Leg Glide Replacement (All Models)	1-16
Chair Back Replacement (For Models 4850, 4851, 4852, 4853, and 4854)	1-17
Chair Back Replacement (For Models 4855 and 4856)	1-18
Seat Cushion Replacement (All Models)	1-19
Model 4850 - Patient Chair, Lowback, Armless	1-20
Model 4851 - Patient Chair, Lowback, Low Seat	1-21
Model 4852 - Patient Chair, Lowback 22", High Seat	1-22
Model 4853 - Patient Chair, Highback, Low Seat	1-23
Model 4854 - Patient Chair, Highback 22", High Seat	1-24
Model 4855 - Patient Chair, Comfort-Flex, Low Seat	1-25
Model 4856 - Patient Chair, Comfort-Flex 22", High Seat	1-27
Model 4857 - Ottoman	1-29
Warranty	1-30
Limited Lifetime Warranty	1-30
To Obtain Parts and Service	1-30
Return Authorization	1-30
Damaged Merchandise	1-30
International Warranty Clause	1-30

Symbols and Definitions

English

SYMBOLS

	Warning/Caution: Consult accompanying documentation
	Safe Working Load
	Pinch Point
	Manufacturer

WARNING/CAUTION/NOTE DEFINITION

The words **WARNING**, **CAUTION** and **NOTE** carry special meanings and should be carefully reviewed.

WARNING

Alerts the reader about a situation which, if not avoided, could result in death or serious injury. It may also describe potential serious adverse reactions and safety hazards.

CAUTION

Alerts the reader of a potentially hazardous situation which, if not avoided, may result in minor or moderate injury to the user or patient or damage to the equipment or other property. This includes special care necessary for the safe and effective use of the device and the care necessary to avoid damage to a device that may occur as a result of use or misuse.

NOTE

Provides special information to make maintenance easier or important instructions clearer.

Introduction

This manual is designed to assist you with the operation of Michael Graves with Stryker Patient Chairs and Ottoman. Read this manual thoroughly before using the equipment or beginning maintenance on it. To ensure safe operation of this equipment, it is recommended that methods and procedures be established for educating and training staff on the safe operation of this unit.

INTENDED USE

The Michael Graves with Stryker Patient Chairs and Ottoman are intended for pediatric and adult person guest and patient seating use in an indoor medical setting. These products are not intended for infant use or the placement of infant carriers.

The product line consists of chairs without wheels and not electrically powered which, by reason of special shape arms, assist in the ingress or egress of patients, or patients undergoing treatment or examination:

- Model 4851 – Michael Graves with Stryker Lowback Patient Chair
- Model 4852 – Michael Graves with Stryker Lowback 22" Seat Height Patient Chair
- Model 4853 – Michael Graves with Stryker Highback Patient Chair
- Model 4854 – Michael Graves with Stryker Highback 22" Seat Height Patient Chair
- Model 4855 – Michael Graves with Stryker Comfort-Flex Patient Chair
- Model 4856 – Michael Graves with Stryker Comfort-Flex 22" Seat Height Patient Chair

In addition, the product line consists of a chair without arms, without wheels and not electrically powered:

- Model 4850 – Michael Graves with Stryker Armless Patient Chair

Furthermore, the product line consists of an ottoman for foot rest and auxiliary seating use without wheels and not electronically powered and stowable under aforementioned chair models:

- Model 4857 – Michael Graves with Stryker Ottoman

Expected use of the units would have the patient seated on the provided cushioning of the chair, not sitting on the arms, not leaning on arms or chair back while in a standing position, and not standing on the chair seat or ottoman.

For Comfort-Flex (models 4855 and 4856), patients with restriction of fore/aft rocking should not be placed in this unit.

Under typical use, the Michael Graves with Stryker Patient Chairs and Ottoman have an expected life of 10 years and weight capacity of 300 lb (136 kg). One use is defined as an ingress and egress event. Typical use is defined as two uses per day.

PRODUCT DESCRIPTION


The Michael Graves with Stryker Patient Chairs are designed to aid in nose-over-toes positioning. The noteworthy aesthetics of this new patient chair pave the way for superior functionality. The chair is available armless or with arms offering two seat heights with lowback, highback, or Comfort-Flex configurations. An ottoman is also available for foot rest and additional seating.


Introduction

English

SPECIFICATIONS

Note: All dimensions are rounded to the nearest .5 in.

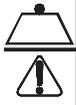		4850 Armless	4851 Lowback	4852 Lowback 22"	4853 Highback
	Safe Working Load	300 lb (136 kg)	300 lb (136 kg)	300 lb (136 kg)	300 lb (136 kg)
Overall Width		22 in (56 cm)	26.5 in (67 cm)	26.5 in (67 cm)	26.5 in (67 cm)
Overall Height		35 in (89 cm)	35 in (89 cm)	39.5 in (100 cm)	43 in (109 cm)
Overall Depth		28 in (71 cm)	30.5 in (77.5 cm)	30.5 in (77.5 cm)	31.5 in (80 cm)
Seat Height from Floor		19 in (48 cm)	19 in (48 cm)	23.5 in (60 cm)	19 in (48 cm)
Seat Depth		20 in (51 cm)	20 in (51 cm)	20 in (51 cm)	20 in (51 cm)
Back Height from Seat		17 in (43 cm)	17 in (43 cm)	17 in (43 cm)	25.5 in (65 cm)
Arm Height from Floor (at mid point seat depth)		Not applicable	26 in (66 cm)	30 in (76 cm)	26 in (66 cm)

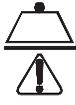		4854 Highback 22"	4855 Comfort-Flex	4856 Comfort-Flex 22"	4857 Ottoman
	Safe Working Load	300 lb (136 kg)	300 lb (136 kg)	300 lb (136 kg)	300 lb (136 kg)
Overall Width		26.5 in (67 cm)	26.5 in (67 cm)	26.5 in (67 cm)	18.5 in (47 cm)
Overall Height		47 in (119.5 cm)	43 in (109 cm)	47 in (119.5 cm)	13 in (33 cm)
Overall Depth		31.5 in (80 cm)	31.5 in (80 cm)	31.5 in (80 cm)	17.5 in (44.5 cm)
Seat Height from Floor		23.5 in (60 cm)	19 in (48 cm)	23.5 in (60 cm)	Not applicable
Seat Depth		20 in (51 cm)	20 in (51 cm)	20 in (51 cm)	Not applicable
Back Height from Seat		25.5 in (65 cm)	25 in (63.5 cm)	25 in (63.5 cm)	Not applicable
Arm Height from Floor (at mid point seat depth)		30 in (76 cm)	26 in (66 cm)	30 in (76 cm)	Not applicable

Stryker reserves the right to change specifications without notice.

Introduction

CONTACT INFORMATION

Contact Stryker Customer Service or Technical Support at (800) 327-0770.

Stryker Medical
3800 E. Centre Avenue
Portage, MI 49002
USA

Please have the serial number of your Stryker product available when calling Stryker Customer Service or Technical Support. Include the serial number in all written communication.

SERIAL NUMBER LOCATION

The serial number (A) for your chair is located on the back of the frame bar under the chair seat (Figure 1) on the content label (Figure 2).



Figure 1: Serial Number Location

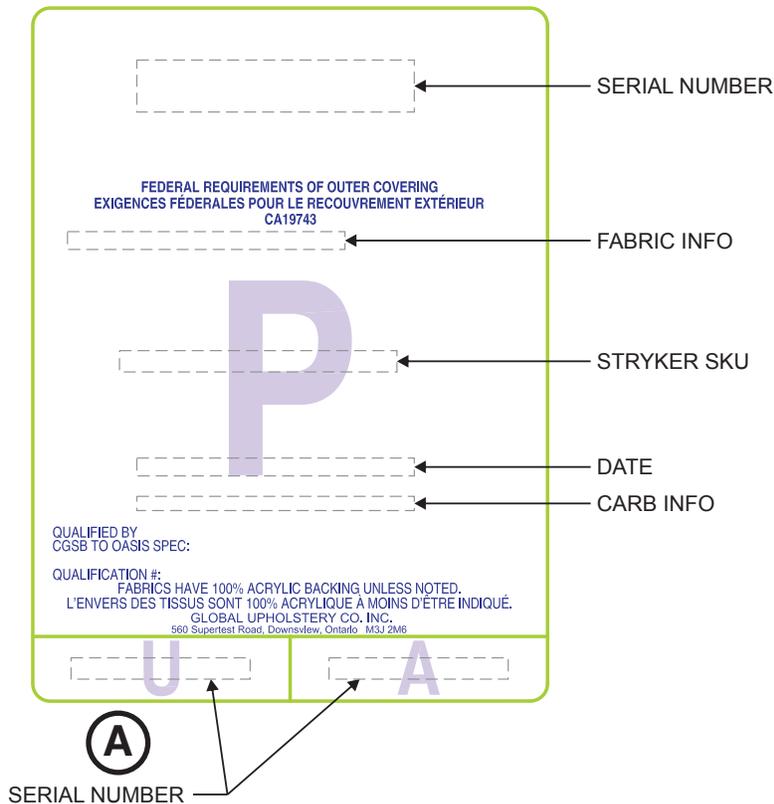


Figure 2: Content Label - Located on Bottom of Seat Cushion

Introduction

English

PRODUCT ILLUSTRATION

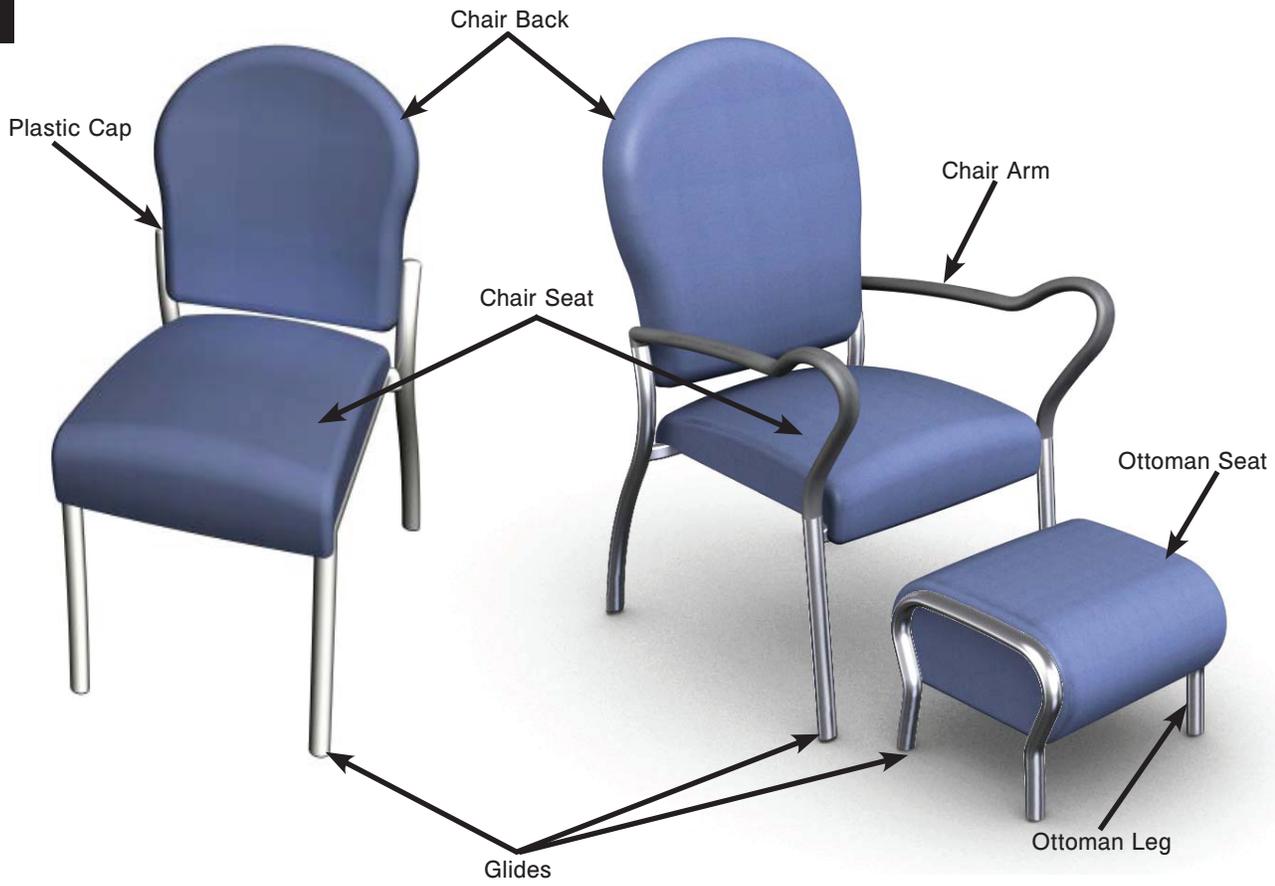


Figure 3: Product Illustration

Summary of Safety Precautions

WARNING

- To avoid the risk of serious injury or product damage, do not stand on chair seat or ottoman.
 - To avoid the risk of serious injury or product damage, do not sit on chair arms.
 - To avoid the risk of serious injury or product damage, while standing behind the chair, do not lean on chair backrest or chair arms.
 - To avoid the risk of serious injury or product damage, keep all four chair legs on the ground when seated.
 - To avoid the risk of serious injury or product damage, do not lay infants or infant carriers in the chair or on the ottoman.
 - To avoid the risk of serious injury, for Comfort-Flex chairs only, do not place patients with restriction of fore/aft rocking in this unit.
 - If punctures or tears are present in the chair arms, upholstered chair seat frame assembly, upholstered chair back, upholstered chair back panel, or upholstered ottoman assembly, replace the assembly or component as this could lead to biocontamination.
 - For armless chairs, do not use if plastic caps are missing as this could lead to biocontamination.
 - Stow the ottoman under the chair when not in use to avoid a tripping hazard.
 - Failure to properly clean a contaminated surface will increase the risk of exposure to bloodborne pathogens.
-

CAUTION

- To avoid the risk of ottoman upholstery damage, with Comfort-Flex chairs only, do not force the ottoman back into the chair frame components.
 - To avoid the risk of product or floor damage, do not use chairs and/or ottoman if all glides are not present.
 - Use a soft, white cloth to clean stained or soiled areas. Avoid use of paper towels.
 - Cleaning products may be harmful to your skin and/or eyes. Use protective gloves and eye protection. Protect the surrounding area and clothing from exposure to cleaners. Do not inhale or swallow any cleaning agents. Follow all cleaning product manufacturer's warnings.
 - The use of certain agents can be harmful to the surface appearance and lifespan of fabrics. Check compatibility of any cleaning product with other surfaces on the furniture, such as painted surfaces or varnish.
 - Clean all stains immediately as some stains may become permanent if not removed quickly.
 - This information is not a guarantee and does not relieve the user from the responsibility of the proper and safe use of these fabrics and all cleaning agents.
 - To avoid the risk of equipment damage to the new back panel, make sure that each push rivet is aligned with each T-nut prior to installation.
 - When cleaning vinyl fabrics, the use of conditioners or protectants is not recommended and should be avoided.
 - The use of quaternary cleaners that contain diethylene glycol butyl ether or alcohol to the underside surfaces of the chair and ottoman may result in compromised legibility of the pre-printed labels. Should this occur, see "Product LabelsProduct Labels" on page 1-11 for the original label text.
-

Summary of Safety Precautions

English

CAUTION (CONTINUED)

- A preventative maintenance program should be established for all equipment. Preventative maintenance may need to be performed more frequently based on the usage level of the product. For additional maintenance information, see the “Checklist” on [page 1-10](#).
- Improper maintenance can cause injury or damage to the product. Maintain the unit as described in this manual. Use only Stryker approved parts and maintenance procedures. Using unapproved parts and procedures could cause unpredictable operation and/or injury and will void the product warranty (see “Warranty” on [page 1-30](#)).
- When using the Comfort-Flex models 4855 and 4856, keep extremities away from identified locations as shown in Figure 4 as potential pinch points exist, which may result in minor or moderate injury.

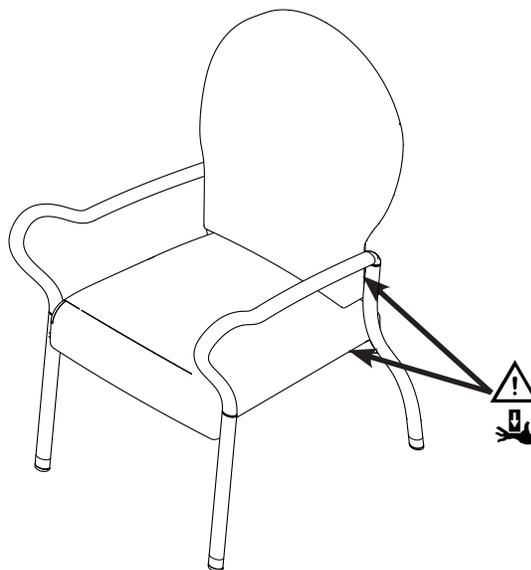


Figure 4: Comfort-Flex Pinch Points

Operation Guide

STOWING THE OTTOMAN

WARNING

Stow the ottoman under the chair when not in use to avoid a tripping hazard.

For model 4851, 4852, 4853, 4854, 4855, and 4856 only, stow the ottoman laterally under the chair from the front when not in use as shown in Figure 5.

CAUTION

To avoid the risk of ottoman upholstery damage, with Comfort-Flex chairs only, do not force the ottoman back into the chair frame components.

For models 4850 only, stow the ottoman rotated under the chair from the front when not in use as shown in Figure 6.



Figure 5: Stow the Ottoman Laterally (as shown) - Models 4851, 4852, 4853, 4854, 4855 and 4856 Only



Figure 6: Stow the Ottoman Rotated (as shown) - Model 4850 Only

Preventative Maintenance

English

Preventative maintenance should be performed at a minimum of annually. A preventative maintenance program should be established for all Stryker Medical equipment. Preventative maintenance may need to be performed more frequently based on the usage level of the product.

CHECKLIST

- _____ All fasteners secure and intact
- _____ All foot glides secure and intact to prevent floor damage
- _____ All chair backs and seat cushions secure and intact
- _____ Both arms are secure and intact
- _____ All welds (metal frames) are secure and intact
- _____ No punctures or tears in the chair arms, upholstered chair seat frame assembly, upholstered chair back, upholstered chair back panel, or upholstered ottoman assembly
- _____ All plastic caps are secure and intact (armless chairs only)
- _____ Comfort-Flex mechanism is functional and moves smoothly (Comfort-Flex chairs only)
- _____ Check labels as specified in the Operations/Maintenance manual for legibility, proper adherence and integrity

CAUTION

- A preventative maintenance program should be established for all equipment. Preventative maintenance may need to be performed more frequently based on the usage level of the product.
- Improper maintenance can cause injury or damage to the product. Maintain the unit as described in this manual. Use only Stryker approved parts and maintenance procedures. Using unapproved parts and procedures could cause unpredictable operation and/or injury and will void the product warranty (see "Warranty" on [page 1-30](#)).

Unit Serial Number:		

Completed by: _____ Date: _____

Cleaning

FABRIC CLEANING AND MAINTENANCE

WARNING

Failure to properly clean a contaminated surface will increase the risk of exposure to bloodborne pathogens.

Follow these instructions to ensure that you are cleaning your Stryker Medical fabrics (vinyl, PVC-Free, PVC-Free with Agion®, Crypton®, Crypton® Green, or Woven Agion®) thoroughly and safely. Deviating from these instructions may cause damage to the material and hinder its performance.

CAUTION

- Use a soft, white cloth to clean stained or soiled areas. Avoid use of paper towels.
- Cleaning products may be harmful to your skin and/or eyes. Use protective gloves and eye protection. Protect the surrounding area and clothing from exposure to cleaners. Do not inhale or swallow any cleaning agents. Follow all cleaning product manufacturer's warnings.
- The use of certain agents can be harmful to the surface appearance and lifespan of fabrics. Check compatibility of any cleaning product with other surfaces on the furniture, such as painted surfaces or varnish.
- Clean all stains immediately as some stains may become permanent if not removed quickly.
- This information is not a guarantee and does not relieve the user from the responsibility of the proper and safe use of these fabrics and all cleaning agents.

Vinyl

Clean all stains as quickly as possible and use the following cleaning procedures in order for best results.

CAUTION

When cleaning vinyl fabrics, the use of conditioners or protectants is not recommended and should be avoided.

Cleaning Protocol A (see table on [page 1-12](#)):

- Remove excess spill with a damp, clean cloth. Clean with a 10 percent mixture of liquid soap and warm water. Rinse with water and dry.
- For stubborn stains, use a straight application of commercially available butyl-based water solvent cleaner. Wipe with a clean cloth. Rinse with water and dry.
- If the stain persists, use a 1 to 1 mixture of isopropyl alcohol and water. Rinse thoroughly with water and then pat dry with a clean, lint-free cloth. If the stain persists after six attempts, then the stain has set and probably cannot be removed.
- For more stubborn or difficult stains, use a 9 to 1 mixture of bleach and water (10 percent bleach to 90 percent water mixture). Rinse with water and dry. If the stain persists, use a clean cloth saturated with the diluted cleaning material and rub the stain in a circular motion. Pat dry with a different clean cloth. Repeat, if necessary.

Cleaning Protocol B (see table on [page 1-12](#)):

- Remove excess spill with a damp, clean cloth. Clean with a 10 percent mixture of liquid soap and warm water. Rinse with water and dry.
- For stubborn stains, apply a solution of liquid cleanser and water with a soft brush. Wipe away the residue with a damp, clean cloth. Dampen a white, clean cloth with a solution of household bleach (10 percent bleach to 90 percent water mixture). Rub gently. Rinse with a damp, clean cloth to remove the bleach concentration.
- If the stain persists, allow a 1 to 10 diluted mixture of bleach and water to puddle on the affected area or apply with a damp, clean cloth for approximately 30 minutes. Rinse with a damp, clean cloth to remove any remaining bleach concentration.

Cleaning

FABRIC CLEANING AND MAINTENANCE (CONTINUED)

Suggested Vinyl Cleaning Protocols:

Follow the cleaning instructions for protocol A or protocol B, as described on [page 1-11](#), for the pattern as shown below.

Pattern	Protocol A	Protocol B
Abacus	X	
Aspen	X	
Avant		X
Banyan	X	
Bari	X	
Bistro		X
Bon Voyage	X	
Capreni	X	
Carlisle		X
Casablanca	X	
Checkmate	X	
Chroma		X
Cirque	X	
Dash	X	
Dodge Ball		X
Facet	X	
Geomet	X	
Juxy	X	
Laredo		X
Lava	X	
Martini	X	

Pattern	Protocol A	Protocol B
Matrix		X
Natural World	X	
Oakwood		X
Olympus	X	
Oxford	X	
Petals		X
Prisma	X	
Raffia	X	
Rally		X
Rialto		X
Rivera	X	
Script	X	
Shantung	X	
Smile		X
Southampton		X
Tendrill		X
Tessuto	X	
Walk the Line	X	
Whitney	X	
Ybor	X	
Ziggy	X	

FABRIC CLEANING AND MAINTENANCE (CONTINUED)

PVC-Free and PVC-Free with Agion®

Clean all stains as quickly as possible and use the following cleaning procedures in order for best results.

- Remove any excess spills with a damp, clean cloth. Clean with a 10 percent mixture of liquid soap and warm water. Rinse with water and dry.
- For stubborn stains, use a 1 to 1 mixture of a commercially available butyl-based water solvent cleaner and water. Rinse with water. Wipe with a clean cloth.
- For more difficult stains, use a 5 to 1 mixture of water and bleach solution (5 parts water to 1 part bleach mixture). Rinse with water and dry. Never use bleach in full strength to clean and/or disinfect PVC-free products.

Note: Use a soft brush or clean cloth saturated with cleaning material. Always test cleaning methods on an inconspicuous area of furniture.

Crypton® and Crypton Green®

To prevent overall soiling, vacuum regularly or brush lightly to remove dirt, dust, and grime is recommended. Spot clean using the foam from a water-based cleaning agent such as a mild detergent or non-solvent upholstery shampoo. Apply foam with a soft rag or brush in a circular motion. Vacuum when dry. Always pretest a small area before proceeding.

Remove all soil and spills as quickly as possible.

- Wipe up any spills before they dry using a clean cloth.
- If stain has dried, lightly brush or scrape off the residual and wipe with a wet towel.
- If stain remains, clean fabric with an enzymatic detergent mixed with water (5 parts water with 1 part enzyme detergent mixture). Scrub the area for one minute using a soft nylon brush. Rinse with water leaving no residue. Dry with a clean cloth.
- Repeat if necessary.

Do not use solvent based cleaners as they may harm the fabric.

Woven Agion®

You can use water-based cleaning agents and foam for cleaning Woven Agion®. You can also clean with mild, water-free solvents. Cleaning by a professional service is recommended.

- For easy cleaning of recent soiling, most stains can be wiped off with a clean cloth.
- For stubborn stains, clean with a 10 percent mixture of liquid soap and warm water. Apply diluted cleaning solution to a clean cloth or soft brush. Moisten a clean cloth with clear water and revisit stain to wipe off and rinse. Let air dry.
- For more stubborn or difficult stains, use a mild solvent cleaner mixed with water. Rinse with water. Wipe with clean cloth.
- If the stain persists, use a 1 to 5 mixture of bleach solution and water (1 part bleach to 5 parts water mixture) with a maximum of 20 percent bleach. Blot stain with a clean cloth saturated in the diluted bleach mixture. Rinse stain area with a damp, clean cloth and let dry. Bleach solutions not completely removed could fade the fabric. Never use bleach in full strength to clean these fabrics.

Note: Use a soft brush or cloth saturated with cleaning material. Test cleaning methods on an inconspicuous area of the furniture. If the stain persists, then the stain has probably set. Although these fabrics are resistant to most common stains, some agents, such as ink, can create a permanent stain. Clean all stains as quickly as possible.

Cleaning

FRAME AND ARM CLEANING

Cleaners for frame and arm cleaning include:

- Quaternary (active ingredient - ammonium chloride)
- Phenolic (active ingredient - o-phenylphenol)
- Alcohol-based (maximum 70 percent alcohol content)
- Bleach (1 part bleach to 100 parts water)

A recommended cleaner is a chlorinated bleach solution (less than 1 part bleach to 100 parts water mixture). For example, a 6 percent bleach solution diluted to 165 milliliter of bleach solution per 1 liter of water or 20 ounces of bleach solution per 1 gallon of water. Thoroughly rinse the solution from the product surface. If other hospital-grade cleaning agents listed above are used, follow the instructions provided by the cleaning solution's manufacturer. Do not allow cleaning solutions or other fluids to pool on the unit. Wipe the surface with a dry, clean cloth to remove any moisture.

CAUTION

The use of quaternary cleaners that contain diethylene glycol butyl ether or alcohol to the underside surfaces of the chair and ottoman may result in compromised legibility of the pre-printed labels. Should this occur, see "Product LabelsProduct Labels" on page 1-11 for the original label text.

Quick Reference Replacement Parts List

The parts and accessories listed on this [page](#) are all currently available for purchase. Some of the parts identified on the assembly drawing parts in this manual may not be individually available for purchase. Please call Stryker Customer Service USA at 1-800-327-0770 for availability and pricing.

English

Part Name	Part Number
Back Cushion Kit, Lowback	4850-700-001
Back Cushion Kit, Highback	4853-700-001
Back Cushion Kit, Comfort-Flex	4856-700-001
Glide, Black (Color packages A, D, and E only)	4850-100-127
Glide, Stone (Color packages B and C only)	4850-100-128
Plastic Cap, Chestnut (Armless chair - color package A only)	4850-100-115
Plastic Cap, White (Armless chair - color package B only)	4850-100-117
Plastic Cap, Satin Nickel (Armless chair - color package C only)	4850-100-116
Plastic Cap, Orange/Brown (Armless chair - color package D only)	4850-100-118
Plastic Cap, Black (Armless chair - color package E only)	4850-100-114
Seat Foam Assembly, Upholstered (Armless chair only)	4850-020-100
Seat Foam Assembly, Upholstered (Chairs with arms only)	4853-020-100

Service Information

English

LEG GLIDE REPLACEMENT (ALL MODELS)

Tools Required:

- Hammer
- Slotted Screwdriver

Procedure:

1. Flip the chair or ottoman upside down, so the legs are off the ground.

Note: Place a sheet or equivalent on the floor to protect the chair or ottoman fabric from damage.

2. Using a hammer and slotted screwdriver, carefully remove the damaged leg glide (A) from the leg (B) as shown in Figure 7 (ottoman leg) or Figure 8 (chair leg). Discard the glide.
3. Using a hammer, install the new leg glide by hitting it into the chair or ottoman leg until it is flush with the end of the leg.

Note: The leg glide is tapered. Before installing, make sure that the thinner side is positioned inward to the middle of the chair or ottoman.

4. Flip the chair or ottoman back upright.
5. Verify proper operation of the unit before returning it to service.

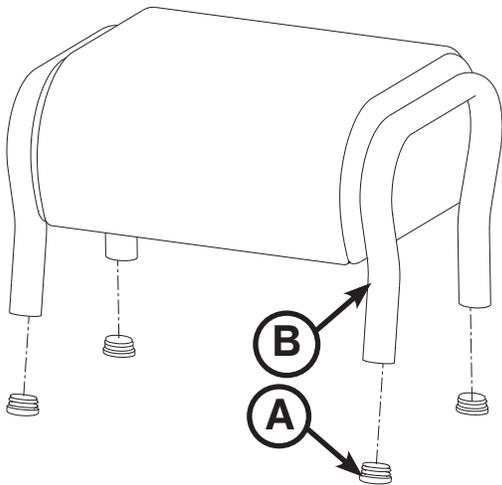


Figure 7: Ottoman Leg Glide Replacement

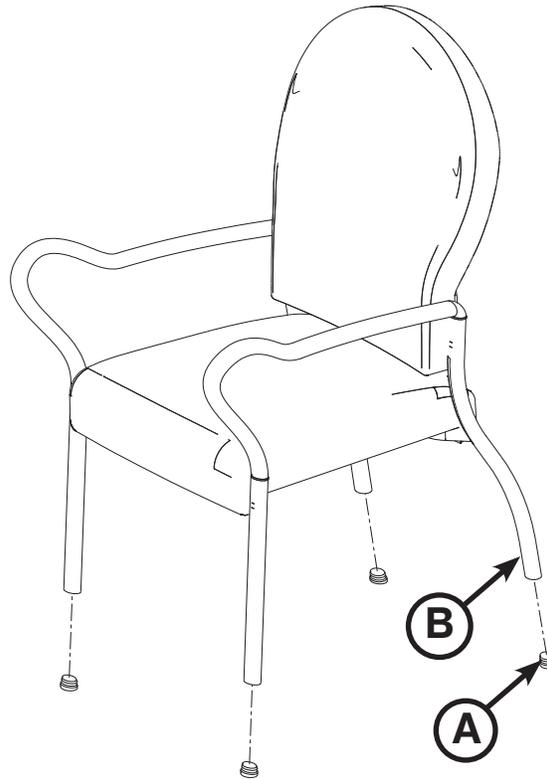


Figure 8: Chair Leg Glide Replacement

Service Information

English

CHAIR BACK REPLACEMENT (FOR MODELS 4850, 4851, 4852, 4853, AND 4854)

For Models 4850, 4851, and 4852, install kit (p/n 4850-700-001)

For Models 4853 and 4854, install kit (p/n 4853-700-001)

Tools Required:

- Large Slotted Screwdriver
- #3 Phillips Screwdriver

Procedure:

1. Using a large slotted screwdriver, carefully remove the back panel (A) from the back cushion (B) (Figure 9).

Note: There are seven push rivets (C) for models 4850, 4851, and 4852 that secure the back panel to the back cushion. There are nine push rivets (C) for models 4853 and 4854 that secure the back panel to the back cushion (Figure 9).

2. Using a #3 Phillips screwdriver, remove the four screws (D) that secure the back cushion to the chair frame (E) and remove the back cushion (Figure 9). Discard the back cushion, back panel, and screws.
3. Using a #3 Phillips screwdriver, install the supplied four screws to secure the new back cushion to the chair frame. Start each screw first, then tighten all four.
4. Install the new back panel into the new back cushion by aligning all seven push rivets to the back cushion T-nuts. Push each push rivet in carefully by feeling for it from the outside of the fabric.

Note: Make sure that each push rivet is fully seated and the back panel is tight to the back cushion.

CAUTION

To avoid the risk of equipment damage to the new back panel, make sure that each push rivet is aligned with each T-nut prior to installation.

5. Verify proper operation of the unit before returning it to service.

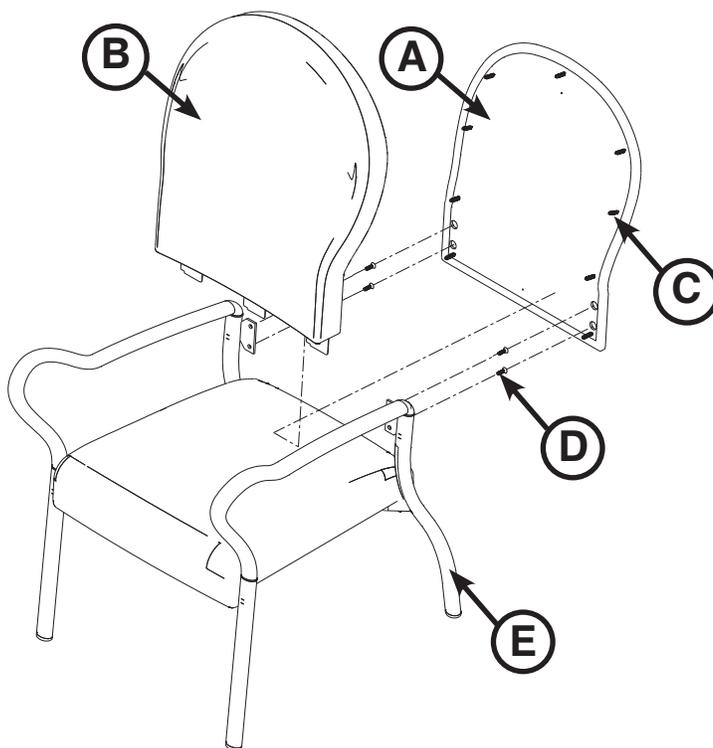


Figure 9: Back Replacement (Model 4853 shown)

Service Information

English

CHAIR BACK REPLACEMENT (FOR MODELS 4855 AND 4856)

For Models 4855 and 4856, install kit (p/n 4856-700-001)

Tools Required:

- Slotted Screwdriver
- #3 Phillips Screwdriver

Procedure:

1. Using a large slotted screwdriver, carefully remove the back panel (A) from the back cushion (B) (Figure 10).

Note: There are eleven push rivets (C) that secure the back panel to the back cushion (Figure 10).

2. Using a #3 Phillips screwdriver, remove the six screws (D) that secure the back cushion to the chair frame (E) and remove the back cushion (Figure 10). Discard the back cushion, back panel, and screws.
3. Using a #3 Phillips screwdriver, install the supplied six screws to secure the new back cushion to the chair frame. Start each screw first, then tighten all six.
4. Install the new back panel into the new back cushion by aligning all eleven push rivets to the back cushion T-nuts. Push each push rivet in carefully by feeling for it from the outside of the fabric.

Note: Make sure that each push rivet is fully seated and the back panel is tight to the back cushion.

CAUTION

To avoid the risk of equipment damage to the new back panel, make sure that each push rivet is aligned with each T-nut prior to installation.

5. Verify proper operation of the unit before returning it to service.

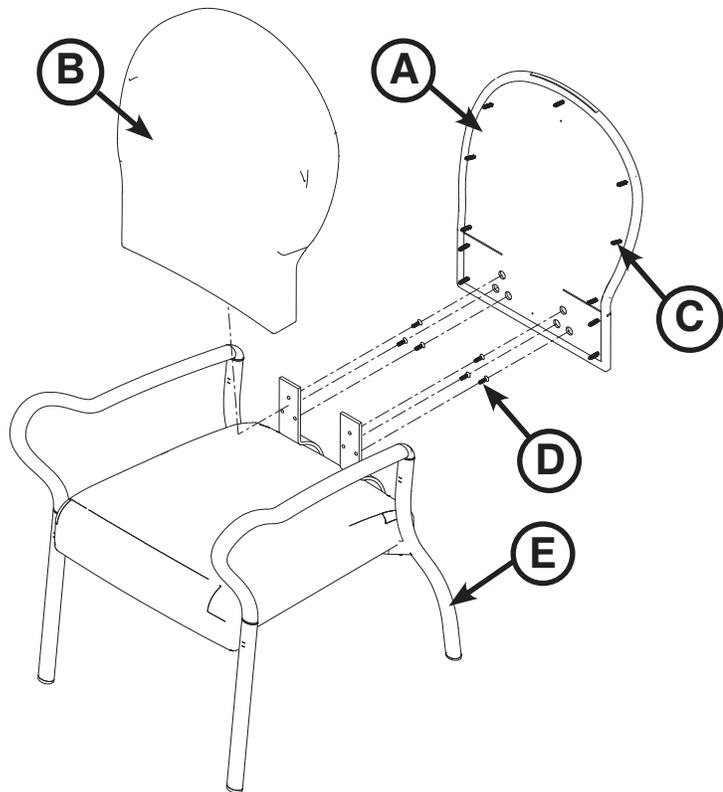


Figure 10: Back Replacement (Model 4855 shown)

Service Information

English

SEAT CUSHION REPLACEMENT (ALL MODELS)

Tools Required:

- #3 Phillips Screwdriver

Procedure:

1. Flip the chair upside down, so the chair legs are off the ground.

Note: Place a sheet or equivalent on the floor to protect the chair fabric from damage.

2. Using a #3 Phillips screwdriver, remove the four screws (A) that secure the seat cushion (B) to the chair frame (C) and remove the cushion (Figure 11). Discard the cushion and screws.
3. Using a #3 Phillips screwdriver, install the supplied four screws to secure the new seat cushion to the chair frame. Start each screw first, then tighten all four.
4. Flip the chair back upright.
5. Verify proper operation of the unit before returning it to service.


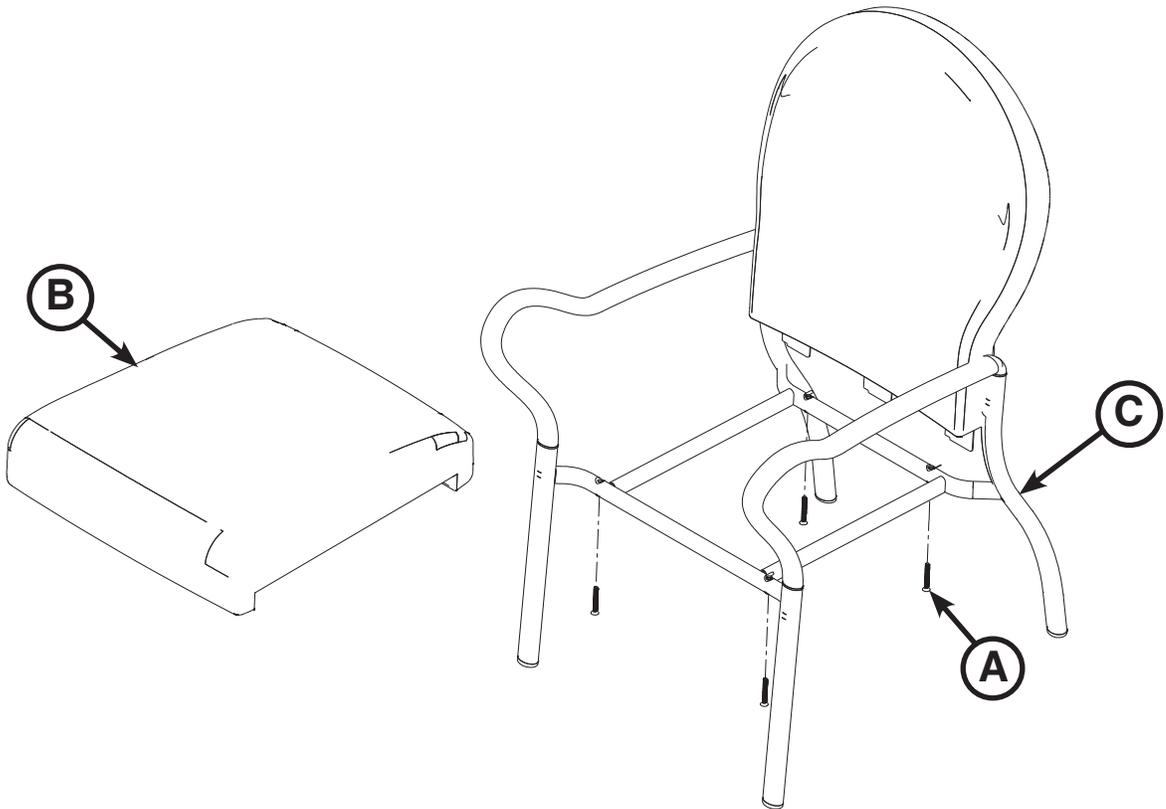


Figure 11: Seat Cushion Replacement

Model 4850 - Patient Chair, Lowback, Armless

4850-010-000 Rev D (Reference Only)

English

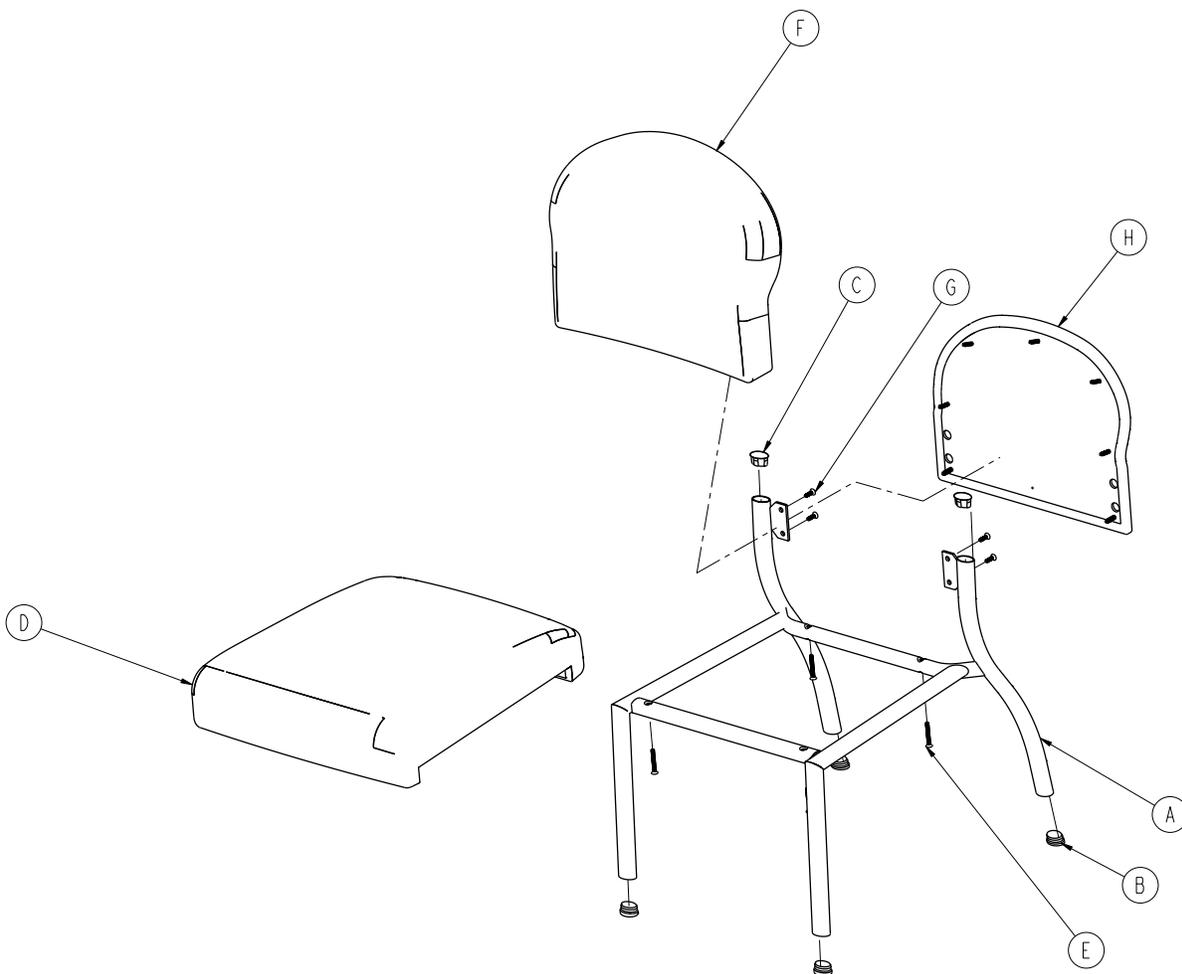

Item	Description	Qty.	4850-010-001 Chestnut (A)	4850-010-002 White (B)	4850-010-003 Satin Nickel (C)	4850-010-004 Orange/ Brown (D)	4850-010-005 Black (E)
A	Frame Assembly, Armless	1	4850-110-012*	4850-110-014*	4850-110-013*	4850-110-015*	4850-110-011*
B	Glide	4	4850-100-127	4850-100-128	4850-100-128	4850-100-127	4850-100-127
C	Plastic Cap	2	4850-100-115	4850-100-117	4850-100-116	4850-100-118	4850-100-114
D	Seat Foam Assy, Upholstered	1	4850-020-100	4850-020-100	4850-020-100	4850-020-100	4850-020-100
E	Socket Head Cap Screw	4	0004-001-002	0004-001-002	0004-001-002	0004-001-002	0004-001-002
F	Back, Lowback, Upholstered	1	4851-010-100**	4851-010-100**	4851-010-100**	4851-010-100**	4851-010-100**
G	Socket Head Cap Screw	4	0004-001-003**	0004-001-003**	0004-001-003**	0004-001-003**	0004-001-003**
H	Back Panel, Lowback, Upholstered	1	4851-011-100**	4851-011-100**	4851-011-100**	4851-011-100**	4851-011-100**


* Shown for reference only. These parts or assemblies are not available individually for sale.

** For kits, see "Quick Reference Replacement Parts List" on [page 1-15](#).

Model 4851 - Patient Chair, Lowback, Low Seat

4851-010-000 Rev D (Reference Only)

English

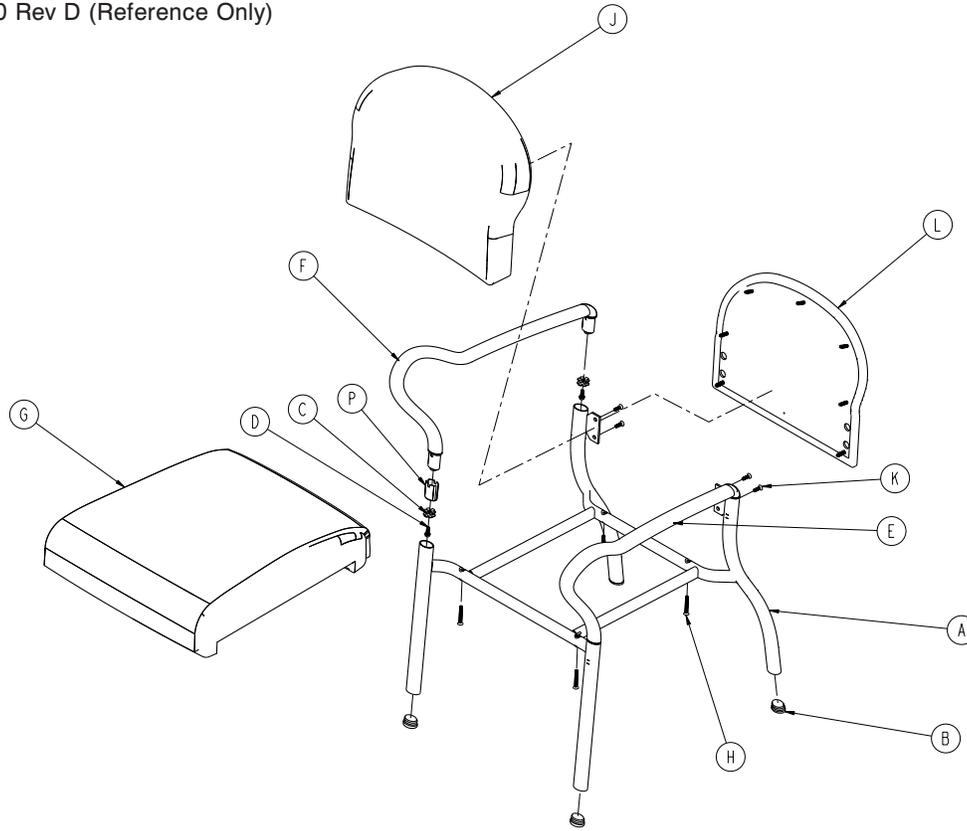

Item	Description	Qty.	4851-010-001 Chestnut (A)	4851-010-002 White (B)	4851-010-003 Satin Nickel (C)	4851-010-004 Orange/ Brown (D)	4851-010-005 Black (E)
A	Frame Assembly, Low Seat	1	4853-110-012*	4853-110-014*	4853-110-013*	4853-110-015*	4853-110-011*
B	Glide	4	4850-100-127	4850-100-128	4850-100-128	4850-100-127	4850-100-127
C	Tube Connector	4	0018-040-000*	0018-040-000*	0018-040-000*	0018-040-000*	0018-040-000*
D	Hex Head Cap Screw	4	0003-149-000*	0003-149-000*	0003-149-000*	0003-149-000*	0003-149-000*
E	Arm, Left	1	4851-200-031*	4851-200-032*	4851-200-032*	4851-200-031*	4851-200-031*
F	Arm, Right	1	4851-200-041*	4851-200-042*	4851-200-042*	4851-200-041*	4851-200-041*
G	Seat Foam Assy, Upholstered	1	4853-020-100	4853-020-100	4853-020-100	4853-020-100	4853-020-100
H	Socket Head Cap Screw	4	0004-001-002	0004-001-002	0004-001-002	0004-001-002	0004-001-002
J	Back, Lowback, Upholstered	1	4851-010-100**	4851-010-100**	4851-010-100**	4851-010-100**	4851-010-100**
K	Socket Head Cap Screw	4	0004-001-003**	0004-001-003**	0004-001-003**	0004-001-003**	0004-001-003**
L	Back Panel, Lowback, Upholstered	1	4851-011-100**	4851-011-100**	4851-011-100**	4851-011-100**	4851-011-100**
P	Sleeve, Arm Post	2	4851-200-001	4851-200-001	4851-200-001	4851-200-001	4851-200-001

* Shown for reference only. These parts or assemblies are not available individually for sale.


** For kits, see "Quick Reference Replacement Parts List" on [page 1-15](#).

[Return To Table of Contents](#)

Model 4852 - Patient Chair, Lowback 22", High Seat

4852-010-000 Rev C (Reference Only)

English

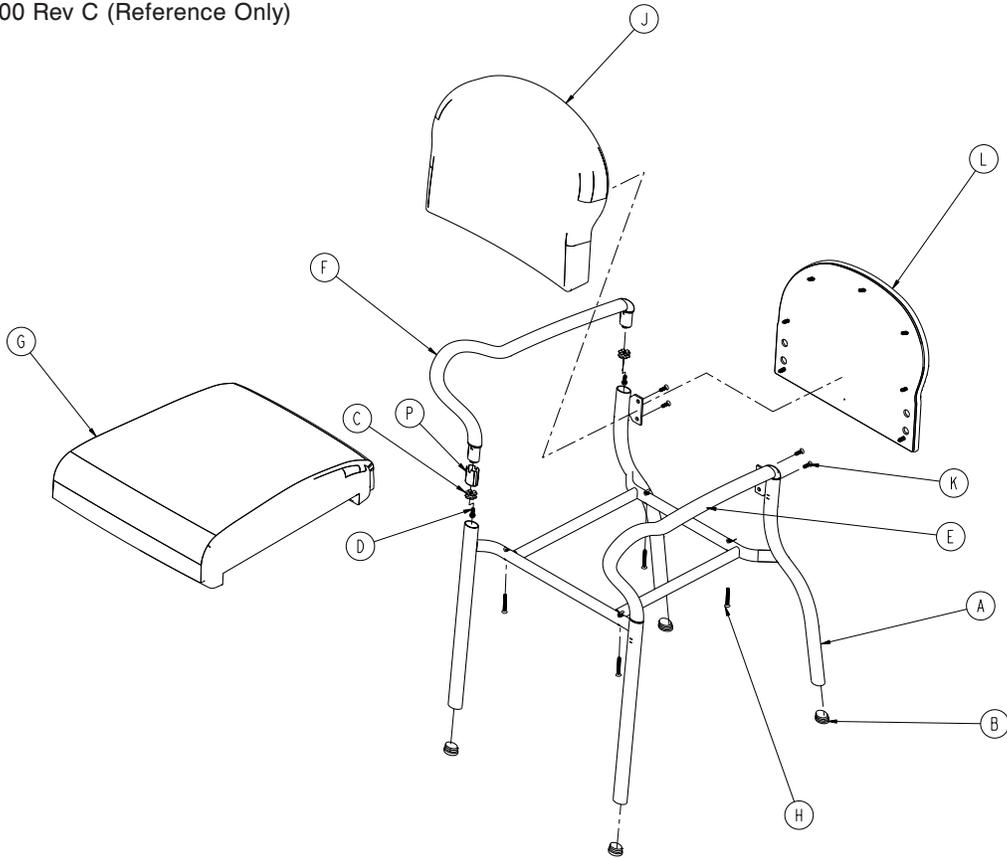

Item	Description	Qty.	4852-010-001 Chestnut (A)	4852-010-002 White (B)	4852-010-003 Satin Nickel (C)	4852-010-004 Orange/ Brown (D)	4852-010-005 Black (E)
A	Frame Assembly, High Seat	1	4854-110-012*	4854-110-014*	4854-110-013*	4854-110-015*	4854-110-011*
B	Glide	4	4850-100-127	4850-100-128	4850-100-128	4850-100-127	4850-100-127
C	Tube Connector	4	0018-040-000*	0018-040-000*	0018-040-000*	0018-040-000*	0018-040-000*
D	Hex Head Cap Screw	4	0003-149-000*	0003-149-000*	0003-149-000*	0003-149-000*	0003-149-000*
E	Arm, Left	1	4851-200-031*	4851-200-032*	4851-200-032*	4851-200-031*	4851-200-031*
F	Arm, Right	1	4851-200-041*	4851-200-042*	4851-200-042*	4851-200-041*	4851-200-041*
G	Seat Foam Assy, Upholstered	1	4853-020-100	4853-020-100	4853-020-100	4853-020-100	4853-020-100
H	Socket Head Cap Screw	4	0004-001-002	0004-001-002	0004-001-002	0004-001-002	0004-001-002
J	Back, Lowback, Upholstered	1	4851-010-100**	4851-010-100**	4851-010-100**	4851-010-100**	4851-010-100**
K	Socket Head Cap Screw	4	0004-001-003**	0004-001-003**	0004-001-003**	0004-001-003**	0004-001-003**
L	Back Panel, Lowback, Upholstered	1	4851-011-100**	4851-011-100**	4851-011-100**	4851-011-100**	4851-011-100**
P	Sleeve, Arm Post	2	4851-200-001	4851-200-001	4851-200-001	4851-200-001	4851-200-001

* Shown for reference only. These parts or assemblies are not available individually for sale.


** For kits, see "Quick Reference Replacement Parts List" on [page 1-15](#).

[Return To Table of Contents](#)

Model 4853 - Patient Chair, Highback, Low Seat

4853-010-000 Rev D (Reference Only)

English

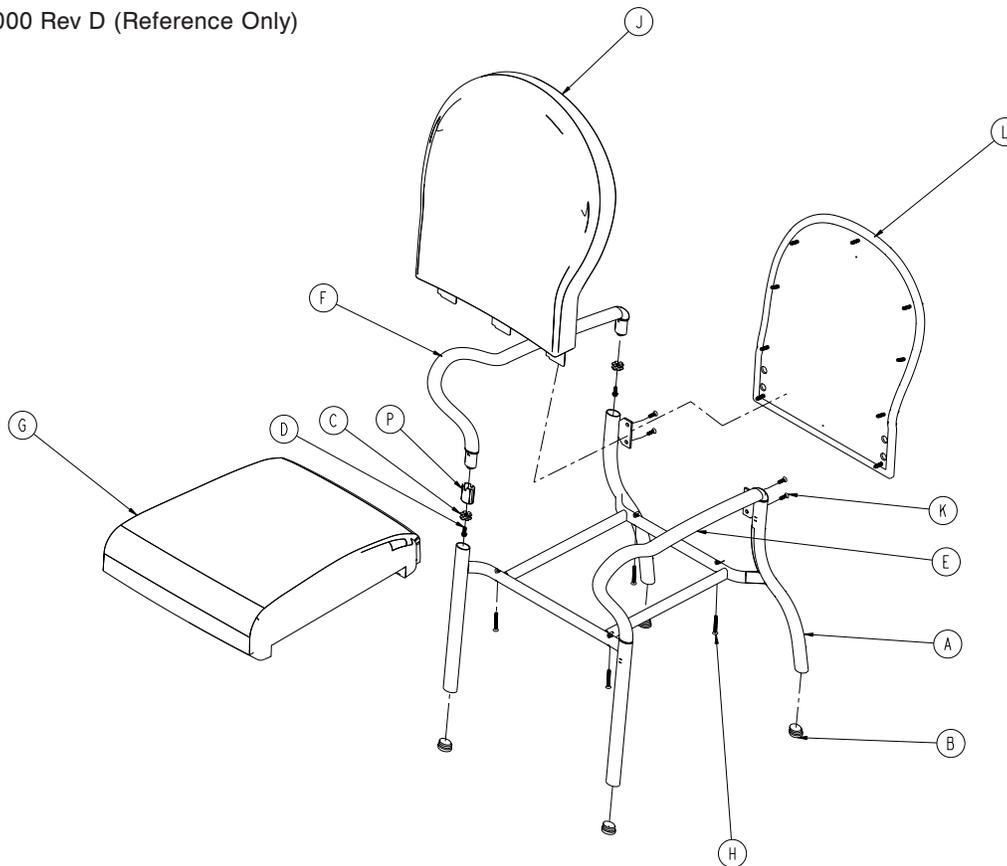

Item	Description	Qty.	4853-010-001 Chestnut (A)	4853-010-002 White (B)	4853-010-003 Satin Nickel (C)	4853-010-004 Orange/ Brown (D)	4853-010-005 Black (E)
A	Frame Assembly, Low Seat	1	4853-110-012*	4853-110-014*	4853-110-013*	4853-110-015*	4853-110-011*
B	Glide	4	4850-100-127	4850-100-128	4850-100-128	4850-100-127	4850-100-127
C	Tube Connector	4	0018-040-000*	0018-040-000*	0018-040-000*	0018-040-000*	0018-040-000*
D	Hex Head Cap Screw	4	0003-149-000*	0003-149-000*	0003-149-000*	0003-149-000*	0003-149-000*
E	Arm, Left	1	4851-200-031*	4851-200-032*	4851-200-032*	4851-200-031*	4851-200-031*
F	Arm, Right	1	4851-200-041*	4851-200-042*	4851-200-042*	4851-200-041*	4851-200-041*
G	Seat Foam Assy, Upholstered	1	4853-020-100	4853-020-100	4853-020-100	4853-020-100	4853-020-100
H	Socket Head Cap Screw	4	0004-001-002	0004-001-002	0004-001-002	0004-001-002	0004-001-002
J	Back, Highback, Upholstered	1	4853-010-100**	4853-010-100**	4853-010-100**	4853-010-100**	4853-010-100**
K	Socket Head Cap Screw	4	0004-001-003**	0004-001-003**	0004-001-003**	0004-001-003**	0004-001-003**
L	Back Panel, Highback, Upholstered	1	4853-011-100**	4853-011-100**	4853-011-100**	4853-011-100**	4853-011-100**
P	Sleeve, Arm Post	2	4851-200-001	4851-200-001	4851-200-001	4851-200-001	4851-200-001

* Shown for reference only. These parts or assemblies are not available individually for sale.


** For kits, see "Quick Reference Replacement Parts List" on [page 1-15](#).

[Return To Table of Contents](#)

Model 4854 - Patient Chair, Highback 22", High Seat

4854-010-000 Rev C (Reference Only)

English

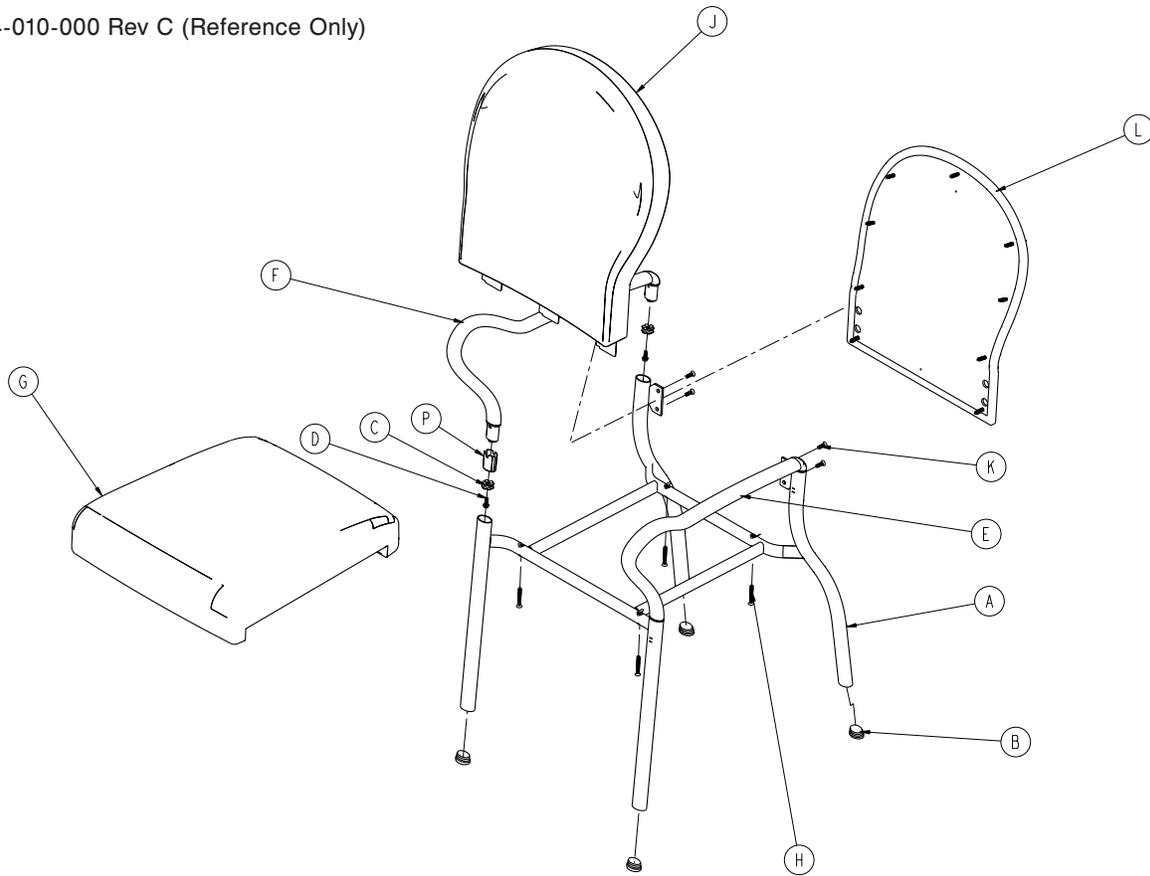

Item	Description	Qty.	4854-010-001 Chestnut (A)	4854-010-002 White (B)	4854-010-003 Satin Nickel (C)	4854-010-004 Orange/ Brown (D)	4854-010-005 Black (E)
A	Frame Assembly, High Seat	1	4854-110-012*	4854-110-014*	4854-110-013*	4854-110-015*	4854-110-011*
B	Glide	4	4850-100-127	4850-100-128	4850-100-128	4850-100-127	4850-100-127
C	Tube Connector	4	0018-040-000*	0018-040-000*	0018-040-000*	0018-040-000*	0018-040-000*
D	Hex Head Cap Screw	4	0003-149-000*	0003-149-000*	0003-149-000*	0003-149-000*	0003-149-000*
E	Arm, Left	1	4851-200-031*	4851-200-032*	4851-200-032*	4851-200-031*	4851-200-031*
F	Arm, Right	1	4851-200-041*	4851-200-042*	4851-200-042*	4851-200-041*	4851-200-041*
G	Seat Foam Assy, Upholstered	1	4853-020-100	4853-020-100	4853-020-100	4853-020-100	4853-020-100
H	Socket Head Cap Screw	4	0004-001-002	0004-001-002	0004-001-002	0004-001-002	0004-001-002
J	Back, Highback, Upholstered	1	4853-010-100**	4853-010-100**	4853-010-100**	4853-010-100**	4853-010-100**
K	Socket Head Cap Screw	4	0004-001-003**	0004-001-003**	0004-001-003**	0004-001-003**	0004-001-003**
L	Back Panel, Highback, Upholstered	1	4853-011-100**	4853-011-100**	4853-011-100**	4853-011-100**	4853-011-100**
P	Sleeve, Arm Post	2	4851-200-001	4851-200-001	4851-200-001	4851-200-001	4851-200-001

* Shown for reference only. These parts or assemblies are not available individually for sale.


** For kits, see "Quick Reference Replacement Parts List" on [page 1-15](#).

[Return To Table of Contents](#)

Model 4855 - Patient Chair, Comfort-Flex, Low Seat

4855-010-000 Rev F (Reference Only)

English

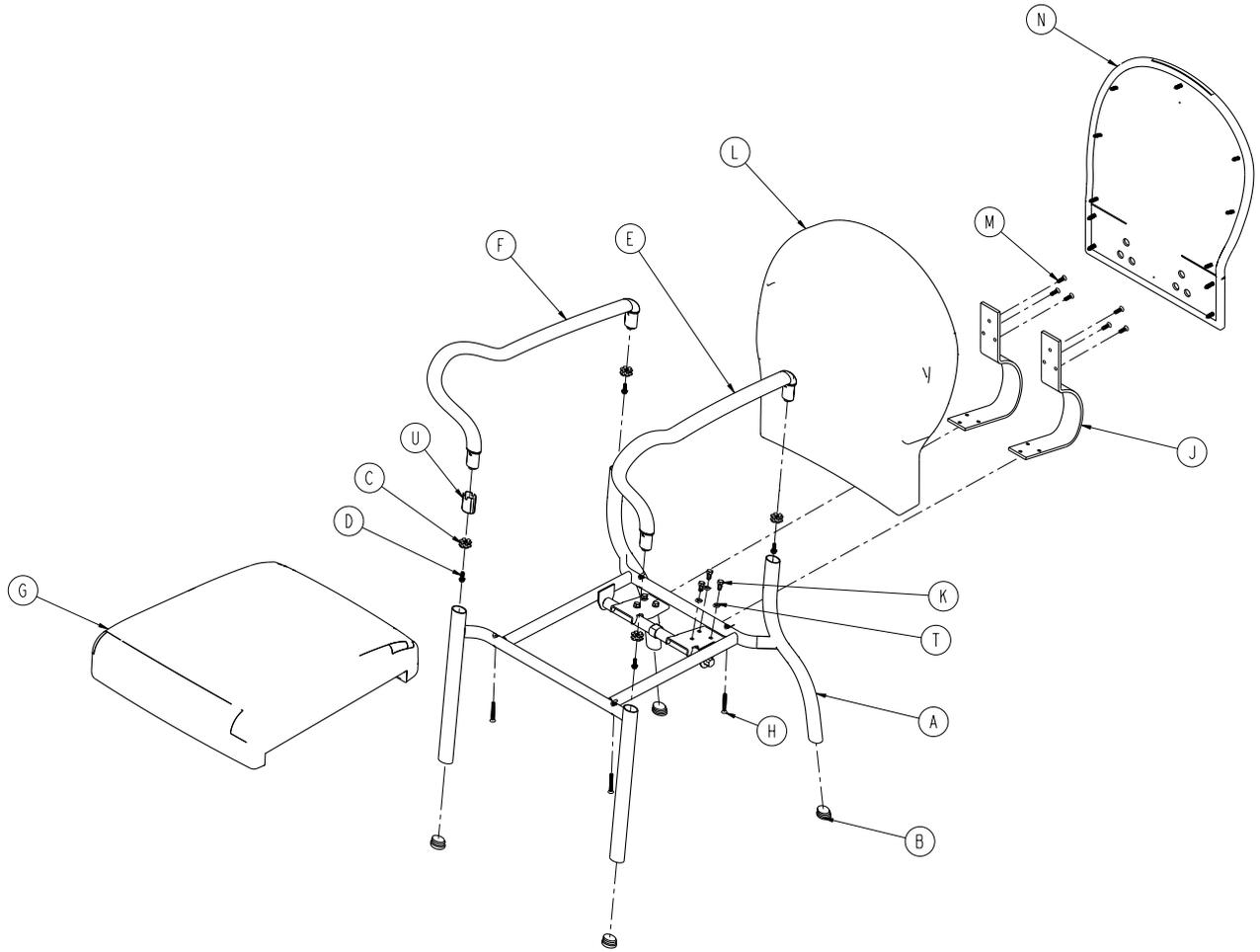

[Return To Table of Contents](#)

Model 4855 - Patient Chair, Comfort-Flex, Low Seat

English

Item	Description	Qty.	4855-010-001 Chestnut (A)	4855-010-002 White (B)	4855-010-003 Satin Nickel (C)	4855-010-004 Orange/ Brown (D)	4855-010-005 Black (E)
A	Frame Assembly, Low Seat, Flexback	1	4855-110-012*	4855-110-014*	4855-110-013*	4855-110-015*	4855-110-011*
B	Glide	4	4850-100-127	4850-100-128	4850-100-128	4850-100-127	4850-100-127
C	Tube Connector	4	0018-040-000*	0018-040-000*	0018-040-000*	0018-040-000*	0018-040-000*
D	Hex Head Cap Screw	4	0003-149-000*	0003-149-000*	0003-149-000*	0003-149-000*	0003-149-000*
E	Arm, Left	1	4851-200-031*	4851-200-032*	4851-200-032*	4851-200-031*	4851-200-031*
F	Arm, Right	1	4851-200-041*	4851-200-042*	4851-200-042*	4851-200-041*	4851-200-041*
G	Seat Foam Assembly, Upholstered	1	4853-020-100	4853-020-100	4853-020-100	4853-020-100	4853-020-100
H	Socket Head Cap Screw	4	0004-001-002	0004-001-002	0004-001-002	0004-001-002	0004-001-002
J	J-Bar Bracket	2	4855-100-135	4855-100-137	4855-100-136	4855-100-138	4855-100-134
K	Hex Head Cap Screw	6	0004-001-004	0004-001-004	0004-001-004	0004-001-004	0004-001-004
L	Back, Flexback, Upholstered	1	4855-010-100**	4855-010-100**	4855-010-100**	4855-010-100**	4855-010-100**
M	Socket Head Cap Screw	6	0004-001-003**	0004-001-003**	0004-001-003**	0004-001-003**	0004-001-003**
N	Back Panel, Flexback, Upholstered	1	4855-011-100**	4855-011-100**	4855-011-100**	4855-011-100**	4855-011-100**
T	Lock Washer	6	0012-001-001	0012-001-001	0012-001-001	0012-001-001	0012-001-001
U	Sleeve, Arm Post	2	4851-200-001	4851-200-001	4851-200-001	4851-200-001	4851-200-001


* Shown for reference only. These parts or assemblies are not available individually for sale.

** For kits, see "Quick Reference Replacement Parts List" on [page 1-15](#).

Model 4856 - Patient Chair, Comfort-Flex 22", High Seat

4856-010-000 Rev E (Reference Only)

English

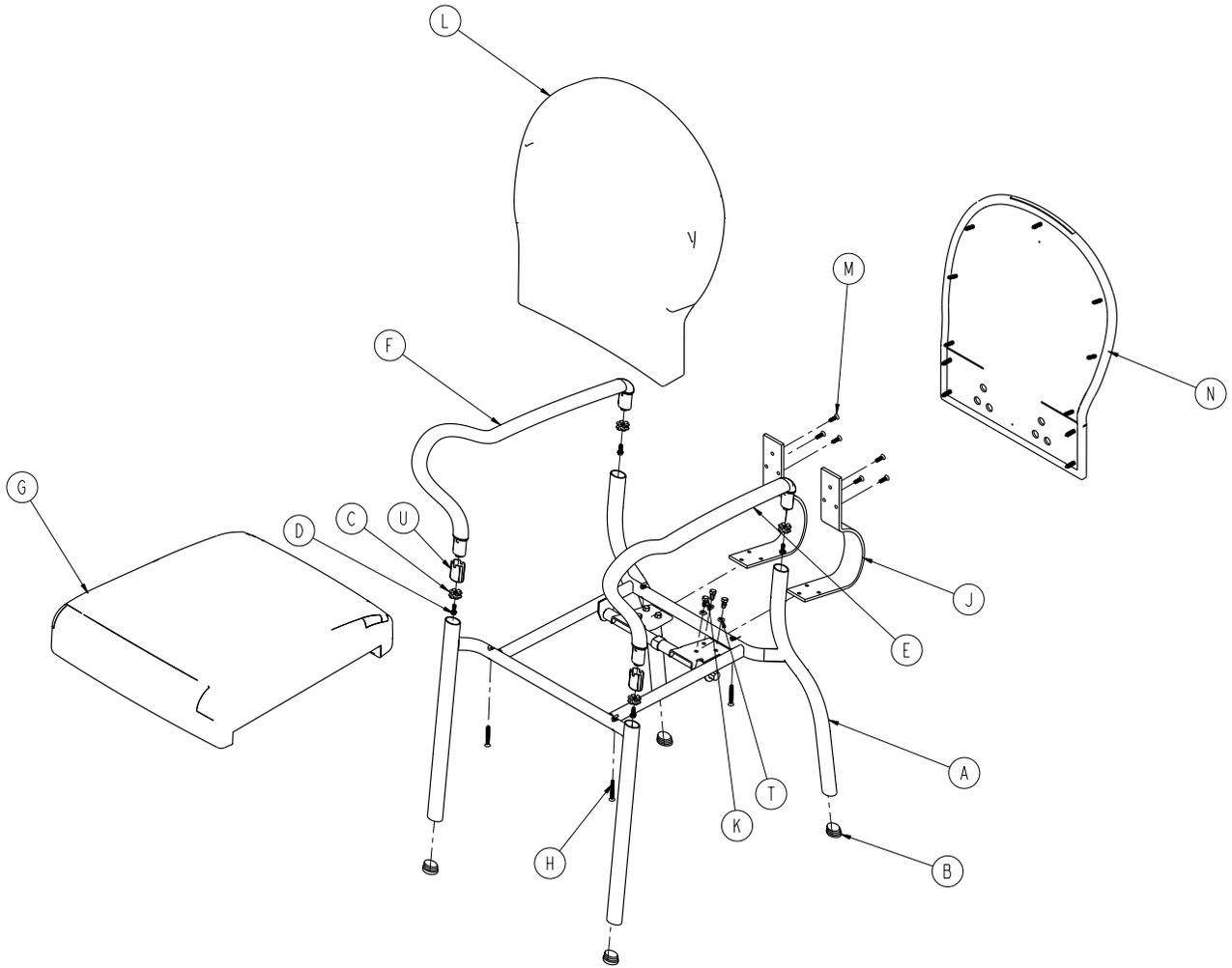

[Return To Table of Contents](#)

Model 4856 - Patient Chair, Comfort-Flex 22", High Seat

English

Item	Description	Qty.	4856-010-001 Chestnut (A)	4856-010-002 White (B)	4856-010-003 Satin Nickel (C)	4856-010-004 Orange/ Brown (D)	4856-010-005 Black (E)
A	Frame Assembly, High Seat, Flexback	1	4856-110-012*	4856-110-014*	4856-110-013*	4856-110-015*	4856-110-011
B	Glide	4	4850-100-127	4850-100-128	4850-100-128	4850-100-127	4850-100-127
C	Tube Connector	4	0018-040-000*	0018-040-000*	0018-040-000*	0018-040-000*	0018-040-000*
D	Hex Head Cap Screw	4	0003-149-000*	0003-149-000*	0003-149-000*	0003-149-000*	0003-149-000*
E	Arm, Left	1	4851-200-031*	4851-200-032*	4851-200-032*	4851-200-031*	4851-200-031*
F	Arm, Right	1	4851-200-041*	4851-200-042*	4851-200-042*	4851-200-041*	4851-200-041*
G	Seat Foam Assembly, Upholstered	1	4853-020-100	4853-020-100	4853-020-100	4853-020-100	4853-020-100
H	Socket Head Cap Screw	4	0004-001-002	0004-001-002	0004-001-002	0004-001-002	0004-001-002
J	J-Bar Bracket	2	4855-100-135	4855-100-137	4855-100-136	4855-100-138	4855-100-134
K	Hex Head Cap Screw	6	0004-001-004	0004-001-004	0004-001-004	0004-001-004	0004-001-004
L	Back, Flexback, Upholstered	1	4855-010-100**	4855-010-100**	4855-010-100**	4855-010-100**	4855-010-100**
M	Socket Head Cap Screw	6	0004-001-003**	0004-001-003**	0004-001-003**	0004-001-003**	0004-001-003**
N	Back Panel, Flexback, Upholstered	1	4855-011-100**	4855-011-100**	4855-011-100**	4855-011-100**	4855-011-100**
T	Lock Washer	6	0012-001-001	0012-001-001	0012-001-001	0012-001-001	0012-001-001
P	Sleeve, Arm Post	2	4851-200-001	4851-200-001	4851-200-001	4851-200-001	4851-200-001


* Shown for reference only. These parts or assemblies are not available individually for sale.

** For kits, see "Quick Reference Replacement Parts List" on [page 1-15](#).

Model 4857 - Ottoman

4857-010-000 Rev E (Reference Only)

English

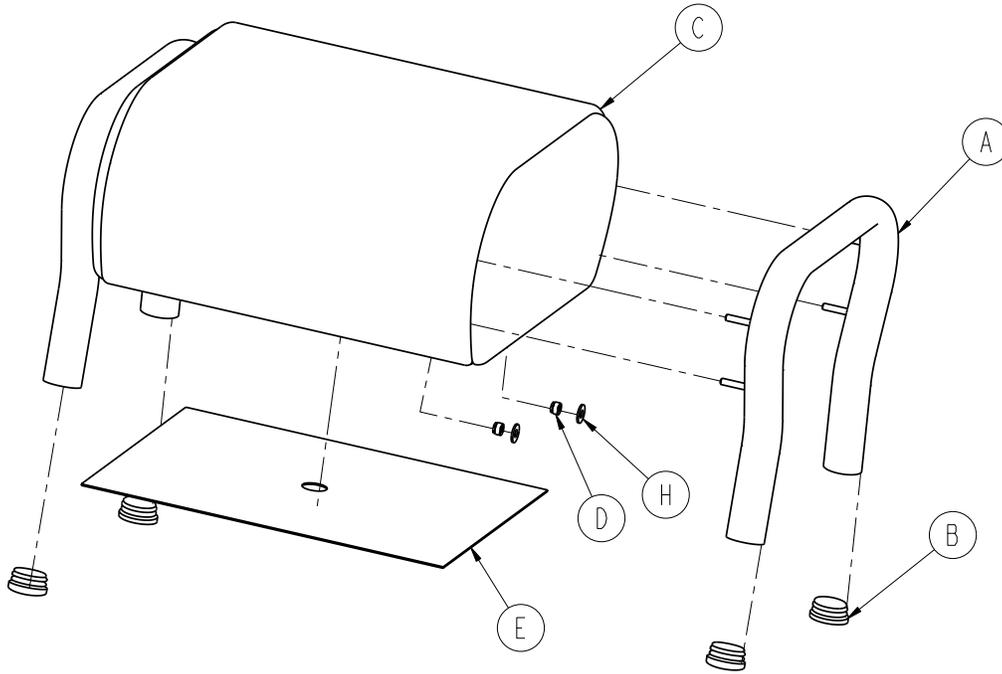

Item	Description	Qty.	4857-010-001 Chestnut (A)	4857-010-002 White (B)	4857-010-003 Satin Nickel (C)	4857-010-004 Orange/ Brown (D)	4857-010-005 Black (E)
A	Frame Assembly, Ottoman	2	4857-110-012*	4857-110-014*	4857-110-013*	4857-110-015*	4857-110-011*
B	Glide	4	4850-100-127	4850-100-128	4850-100-128	4850-100-127	4850-100-127
C	Ottoman Assembly, Upholstered	1	4857-020-100*	4857-020-100*	4857-020-100*	4857-020-100*	4857-020-100*
D	Nylock Hex Nut	8	0016-142-000*	0016-142-000*	0016-142-000*	0016-142-000*	0016-142-000*
E	Ottoman Cardboard	1	4857-020-130*	4857-020-130*	4857-020-130*	4857-020-130*	4857-020-130*
H	Washer	8	0011-001-004*	0011-001-004*	0011-001-004*	0011-001-004*	0011-001-004*

* Shown for reference only. These parts or assemblies are not available individually for sale.

[Return To Table of Contents](#)

Warranty

English

Stryker Medical stands behind the craftsmanship of our products. Providing our customers quality products is our mission, and we pledge to do everything we can to quickly resolve any problems encountered within the terms of the warranties listed below.

LIMITED LIFETIME WARRANTY

Stryker Medical warrants our Michael Graves with Stryker Patient Chairs and Ottoman for the lifetime of the product, classified as 10 years, under normal use and proper care. Subject to the limitations set below, Stryker will repair or, at our option, replace defective merchandise free of charge.

Michael Graves with Stryker Patient Chairs and Ottoman

- 10 years on steel frames and arms
- 10 years on wood frame components
- 3 years on Stryker Medical textiles and foam

The Limited Lifetime warranty listed above is void in cases of modifications, misuse, improper assembly or maintenance, accidents, damage caused by a carrier other than Stryker Medical, and the use of customer's own material.

Stryker makes no other warranty or representation, either expressed or implied, except as set forth herein. There is no warranty of merchantability and there are no warranties of fitness for any particular purpose. In no event shall Stryker be liable hereunder for incidental or consequential damages arising from or in any manner related to sales or use of any such equipment.

TO OBTAIN PARTS AND SERVICE

Stryker products are supported by a nationwide network of dedicated Stryker Field Service Representatives. These representatives are factory trained, available locally, and carry a substantial spare parts inventory to minimize repair time. Simply call your local representative, or call Stryker Customer Service USA at 1-800-327-0770.

RETURN AUTHORIZATION

Merchandise cannot be returned without approval from the Stryker Customer Service Department. An authorization number will be provided which must be printed on the returned merchandise. Stryker reserves the right to charge shipping and restocking fees on returned items. Special, modified, or discontinued, items not subject to return.

DAMAGED MERCHANDISE

ICC Regulations require that claims for damaged merchandise must be made with the carrier within fifteen (15) days of receipt of merchandise. **Do not accept damaged shipments unless such damage is noted on the delivery receipt at the time of receipt.** Upon prompt notification, Stryker will file a freight claim with the appropriate carrier for damages incurred. Claim will be limited in amount to the actual replacement cost. In the event that this information is not received by Stryker within the fifteen (15) day period following the delivery of the merchandise, or the damage was not noted on the delivery receipt at the time of receipt, the customer will be responsible for payment of the original invoice in full. Claims for any short shipment must be made within thirty (30) days of invoice.

INTERNATIONAL WARRANTY CLAUSE

This warranty reflects U.S. domestic policy. Warranty outside the U.S. may vary by country. Please contact your local Stryker Medical representative for additional information.

Table des matières

Symboles et définitions	2-2
Symboles	2-2
Définition de « Avertissement », « Attention » et « Remarque »	2-2
Introduction	2-3
Utilisation prévue	2-3
Description du produit	2-3
Renseignements techniques	2-4
Coordonnées	2-5
Emplacement du numéro de série	2-5
Illustration du produit	2-6
Résumé des consignes de sécurité	2-7
Guide d'utilisation	2-9
Rangement du repose-pieds	2-9
Entretien préventif	2-10
Liste de vérification	2-10
Nettoyage	2-11
Entretien et nettoyage du tissu	2-11
Nettoyage du châssis et des bras	2-14
Liste de référence rapide des pièces de rechange	2-15
Information relative au service	2-16
Remplacement des patins de pieds (tous les modèles)	2-16
Remplacement du dossier de fauteuil (modèles 4850, 4851, 4852, 4853 et 4854)	2-17
Remplacement du dossier de fauteuil (modèles 4855 et 4856)	2-18
Remplacement du coussin de siège (tous les modèles)	2-19
Modèle 4850 : fauteuil de patient, dossier bas, sans bras	2-20
Modèle 4851 : fauteuil de patient, dossier bas, siège bas	2-21
Modèle 4852 : fauteuil de patient, dossier bas 56 cm (22 po), siège haut	2-22
Modèle 4853 : fauteuil de patient, dossier haut, siège bas	2-23
Modèle 4854 : fauteuil de patient, dossier haut 56 cm (22 po), siège haut	2-24
Modèle 4855 : fauteuil de patient, Comfort-Flex, siège bas	2-25
Modèle 4856 : fauteuil de patient, Comfort-Flex 56 cm (22 po), siège haut	2-27
Modèle 4857 : repose-pieds	2-29
Garantie	2-30
Garantie limitée à vie	2-30
Pièces de rechange et service	2-30
Autorisation de renvoi	2-30
Marchandise endommagée	2-30
Clause de garantie internationale	2-30

Symboles et définitions

Français

SYMBOLES

	Avertissement/Attention : Consulter la documentation associée
	Charge maximale de sécurité
	Point de pincement
	Fabricant

DÉFINITION DE « AVERTISSEMENT », « ATTENTION » ET « REMARQUE »

Les rubriques **AVERTISSEMENT**, **ATTENTION** et **REMARQUE** sont particulièrement importantes et doivent faire l'objet d'une lecture attentive.



AVERTISSEMENT

Alerte le lecteur qu'une situation, si elle n'est pas évitée, peut entraîner des blessures graves voire la mort. Ce symbole peut également décrire des réactions potentiellement adverses et des risques importants pour la sécurité.



ATTENTION

Alerte le lecteur d'une situation potentiellement dangereuse susceptible d'entraîner des blessures mineures ou modérées au patient ou à l'utilisateur si elle n'est pas évitée, et l'endommagement de l'équipement ou d'autres biens. Couvre notamment les précautions à prendre afin d'assurer l'utilisation sécuritaire et efficace de l'équipement et d'éviter les dommages qui pourraient découler de son utilisation ou d'une mauvaise utilisation.

REMARQUE :

Fournit des renseignements particuliers pour faciliter l'entretien ou clarifier des instructions importantes.

Introduction

Ce manuel est conçu pour faciliter l'utilisation du mobilier Michael Graves en collaboration avec Stryker pour les fauteuils de patient et repose-pieds. Lire attentivement ce manuel avant d'utiliser cet équipement ou de procéder à son entretien. Pour assurer une utilisation en toute sécurité de cet équipement, il est recommandé d'établir des méthodes et des procédures afin de renseigner et de former le personnel à l'utilisation sécuritaire de cette unité.

UTILISATION PRÉVUE

Le mobilier Michael Graves en collaboration avec Stryker pour les fauteuils de patient et repose-pieds est destiné à permettre aux patients et invités adultes et pédiatriques de s'asseoir à l'intérieur dans un cadre médical. Ces produits ne sont pas destinés aux nourrissons ou à accueillir des nacelles porte-bébé.

La gamme de produits comprend des fauteuils sans roulettes et non motorisés qui, en raison de leurs bras de forme spéciale, permettent aux patients d'atteindre et de quitter leur fauteuil pour se lever ou s'asseoir, ou aident les patients au cours d'un traitement ou d'un examen :

- Modèle 4851 : Michael Graves en collaboration avec Stryker pour les fauteuils de patient et repose-pieds à dossier bas
- Modèle 4852 : Michael Graves en collaboration avec Stryker pour les fauteuils de patient et repose-pieds à dossier bas et hauteur de siège de 56 cm (22 po)
- Modèle 4853 : Michael Graves en collaboration avec Stryker pour les fauteuils de patient et repose-pieds à dossier haut
- Modèle 4854 : Michael Graves en collaboration avec Stryker pour les fauteuils de patient et repose-pieds à dossier haut et hauteur de siège de 56 cm (22 po)
- Modèle 4855 : Michael Graves en collaboration avec Stryker pour les fauteuils de patient et repose-pieds Comfort-Flex
- Modèle 4856 : Michael Graves en collaboration avec Stryker pour les fauteuils de patient et repose-pieds Comfort-Flex à hauteur de siège de 56 cm (22 po)

La gamme de produits propose en outre un fauteuil sans bras, sans roulettes et non motorisé :

- Modèle 4850 : Michael Graves en collaboration avec Stryker pour les fauteuils de patient et repose-pieds sans bras

La gamme de produits comprend également un repose-pieds et un siège auxiliaire sans roulettes et non motorisé qui se range sous les modèles de fauteuils mentionnés plus haut :

- Modèle 4857 : Michael Graves en collaboration avec Stryker pour les fauteuils de patient et repose-pieds

L'utilisation prévue des unités exige que le patient soit assis sur le coussin et non sur les bras du fauteuil, sans s'appuyer sur les bras ou le dossier du fauteuil en position debout, et sans se tenir debout sur le siège ou le repose-pieds du fauteuil.

Pour les modèles Comfort-Flex (modèles 4855 et 4856), ne pas installer les patients avec une restriction du basculement d'avant en arrière dans cette unité.

En condition d'utilisation normale, le mobilier Michael Graves en collaboration avec Stryker pour les fauteuils de patient et repose-pieds a une espérance de vie de dix (10) ans et une capacité pondérale de 136 kg (300 lb). Cette utilisation est définie par le fait d'atteindre et de quitter le fauteuil. Une utilisation typique est deux tels événements par jour.

DESCRIPTION DU PRODUIT


Le mobilier Michael Graves en collaboration avec Stryker pour les fauteuils de patient et repose-pieds est conçu pour aider à garder la bonne posture. L'esthétique remarquable de ce nouveau fauteuil de patient annonce clairement une fonctionnalité supérieure. Le fauteuil est disponible avec ou sans bras et propose deux réglages de hauteur avec les configurations à dossier bas, dossier haut ou Comfort-Flex. Un repose-pieds est également disponible pour l'appui des pieds ou un siège supplémentaire.

Introduction

RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES

Remarque : Toutes les dimensions sont arrondies à 1,27 cm (0,5 pouce).

Français

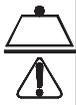		4850 Sans bras	4851 Dossier bas	4852 Dossier bas 56 cm (22 po)	4853 Dossier haut
	Charge maximale de sécurité	136 kg (300 lb)	136 kg (300 lb)	136 kg (300 lb)	136 kg (300 lb)
Largeur globale		56 cm (22 po)	67 cm (26,5 po)	67 cm (26,5 po)	67 cm (26,5 po)
Hauteur globale		89 cm (35 po)	89 cm (35 po)	100 cm (39,5 po)	109 cm (43 po)
Profondeur globale		71 cm (28 po)	77,5 cm (30,5 po)	77,5 cm (30,5 po)	80 cm (31,5 po)
Hauteur de siège à partir du sol		48 cm (19 po)	48 cm (19 po)	60 cm (23,5 po)	48 cm (19 po)
Profondeur du siège		51 cm (20 po)	51 cm (20 po)	51 cm (20 po)	51 cm (20 po)
Hauteur de dossier depuis le siège		43 cm (17 po)	43 cm (17 po)	43 cm (17 po)	65 cm (25,5 po)
Hauteur de bras depuis le sol (au point médian de la profondeur de siège)		Non applicable	66 cm (26 po)	76 cm (30 po)	66 cm (26 po)

		4854 Dossier haut 56 cm (22 po)	4855 Comfort-Flex	4856 Comfort-Flex 56 cm (22 po)	4857 Repose-pieds
	Charge maximale de sécurité	136 kg (300 lb)	136 kg (300 lb)	136 kg (300 lb)	136 kg (300 lb)
Largeur globale		67 cm (26,5 po)	67 cm (26,5 po)	67 cm (26,5 po)	47 cm (18,5 po)
Hauteur globale		119,5 cm (47 po)	109 cm (43 po)	119,5 cm (47 po)	33 cm (13 po)
Profondeur globale		80 cm (31,5 po)	80 cm (31,5 po)	80 cm (31,5 po)	44,5 cm (17,5 po)
Hauteur de siège à partir du sol		60 cm (23,5 po)	48 cm (19 po)	60 cm (23,5 po)	Non applicable
Profondeur du siège		51 cm (20 po)	51 cm (20 po)	51 cm (20 po)	Non applicable
Hauteur de dossier depuis le siège		65 cm (25,5 po)	63,5 cm (25 po)	63,5 cm (25 po)	Non applicable
Hauteur de bras depuis le sol (point médian de la profondeur de siège)		76 cm (30 po)	66 cm (26 po)	76 cm (30 po)	Non applicable

Stryker se réserve le droit de modifier ces caractéristiques sans préavis.

Introduction

COORDONNÉES

L'utilisateur peut communiquer avec le service à la clientèle ou le soutien technique de Stryker au 1-800-327-0770.

Stryker Medical
3800 E. Centre Avenue
Portage, MI 49002
États-Unis

Garder le numéro de série du produit Stryker à portée de main avant d'appeler le service à la clientèle ou le support technique de Stryker. Indiquer le numéro de série dans toutes les communications écrites.

EMPLACEMENT DU NUMÉRO DE SÉRIE

Le numéro de série (A) du fauteuil est situé derrière le barreau du châssis sous le siège (Figure 1) sur l'étiquette du contenu (Figure 2).

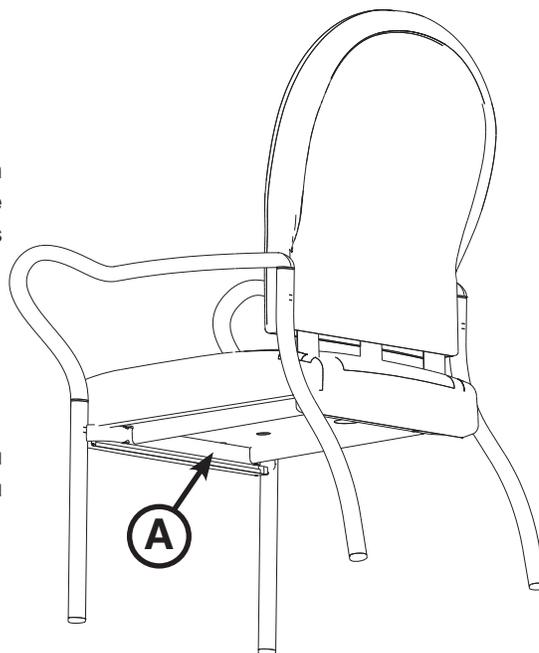


Figure 1 : Emplacement du numéro de série

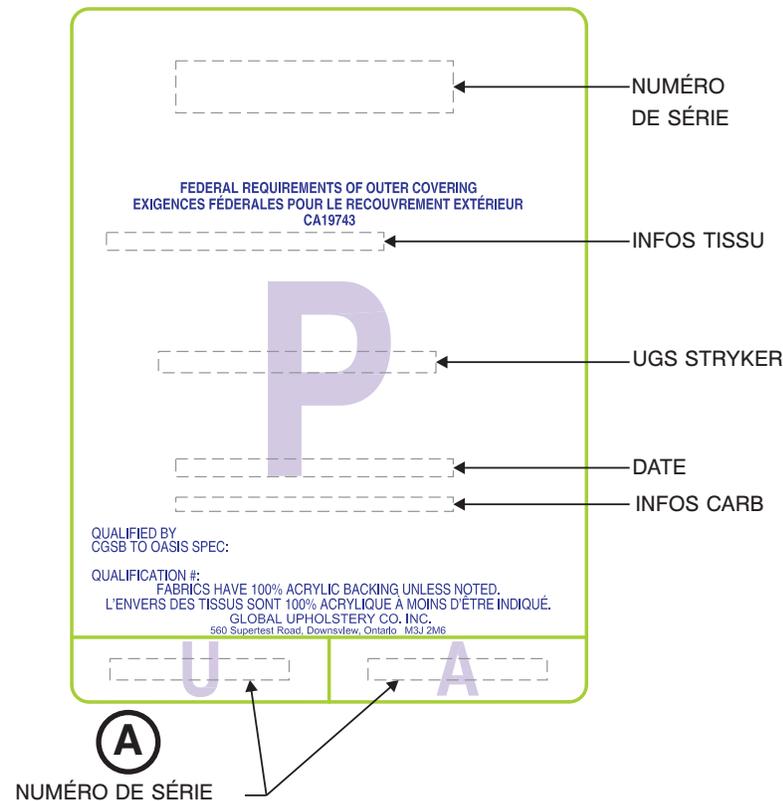


Figure 2 : Étiquette de contenu : située sous le coussin du siège

Introduction

ILLUSTRATION DU PRODUIT

Français

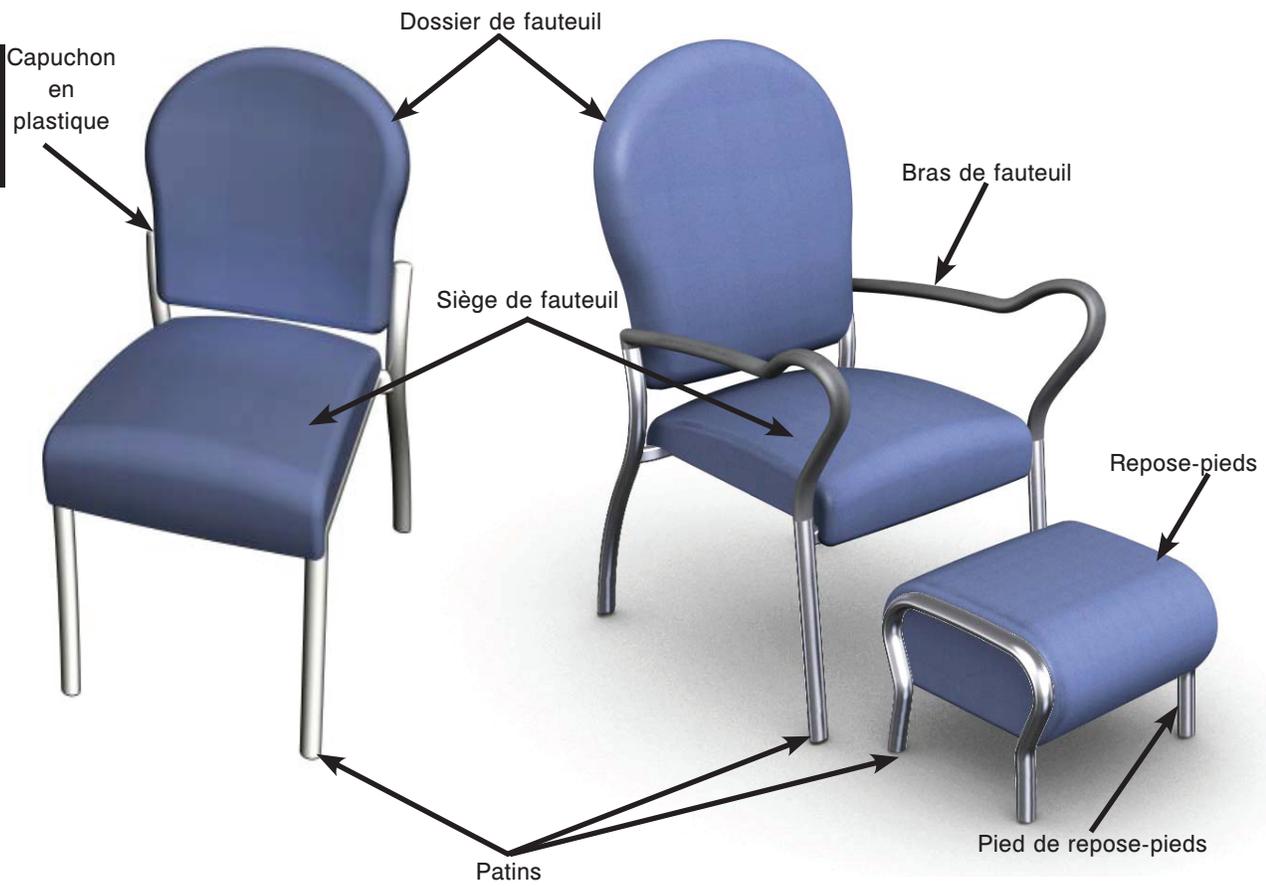


Figure 3 : Illustration du produit

Résumé des consignes de sécurité

AVERTISSEMENT

- Pour éviter le risque de blessure grave ou l'endommagement du produit, on ne doit pas se tenir debout sur le siège du fauteuil ou le repose-pieds.
 - Pour éviter le risque de blessure grave ou l'endommagement du produit, ne pas s'asseoir sur les bras du fauteuil.
 - Pour éviter le risque de blessure grave ou l'endommagement du produit en se tenant derrière le fauteuil, ne pas s'appuyer sur le dossier et les bras du fauteuil.
 - Pour éviter le risque de blessure grave ou l'endommagement du produit, maintenir les quatre pieds du fauteuil au sol en étant assis.
 - Pour éviter le risque de blessure grave ou l'endommagement du produit, ne pas poser de nourrissons ou de nacelles porte-bébé sur le fauteuil ou le repose-pieds.
 - Pour éviter le risque de blessure grave, uniquement pour les fauteuils Comfort-Flex, ne pas positionner les patients avec une restriction du basculement d'avant en arrière dans cette unité.
 - En présence de perforations ou de déchirures dans les bras du fauteuil, sur l'ensemble châssis du fauteuil à siège capitonné, le dossier du fauteuil capitonné, le panneau dorsal du fauteuil capitonné ou l'ensemble repose-pieds capitonné, remplacer l'ensemble ou le composant afin d'éviter une biocontamination.
 - Pour les fauteuils sans bras, ne pas utiliser le produit en l'absence des capuchons en plastique afin d'éviter une biocontamination.
 - Ranger le repose-pieds sous le fauteuil quand il n'est pas utilisé pour éviter les risque de trébuchement.
 - L'absence d'un nettoyage adéquat d'une surface contaminée augmente le risque d'exposition aux pathogènes à diffusion hématogène.
-

MISE EN GARDE

- Pour ne pas endommager le capitonnage du repose-pieds, ne pas forcer le repose-pieds contre les composants du châssis du fauteuil (fauteuils Comfort-Flex uniquement).
- Pour éviter le risque d'endommagement du produit ou du sol, ne pas utiliser le fauteuil et/ou le repose-pieds si tous les patins ne sont pas présents.
- Utiliser un chiffon blanc et doux pour nettoyer les zones souillées ou tachées. Éviter d'utiliser des serviettes essuie-tout.
- Les produits nettoyants peuvent être nocifs à la peau et/ou aux yeux. Utiliser des gants de protection et des protections pour les yeux. Protéger la zone et le tissu environnants de l'exposition aux nettoyants. Ne pas inhaler ni ingérer les agents de nettoyage. Suivre toutes les mises en garde du fabricant du produit nettoyant.
- L'utilisation de certains agents peut nuire à l'aspect de la surface et à la durée de vie des tissus. Vérifier la compatibilité des produits nettoyants avec d'autres surfaces du mobilier, telles que les surfaces peintes ou vernies.
- Nettoyer toutes les taches sans attendre, car certaines taches deviennent permanentes si elles ne sont pas éliminées rapidement.
- Cette information ne constitue pas une garantie et ne dégage pas de la responsabilité d'utiliser correctement et en toute sécurité ces tissus et tous les agents de nettoyage.
- Pour éviter le risque d'endommagement par l'équipement du nouveau panneau arrière, vérifier que chaque rivet à pression est aligné avec son écrou encastré avant l'installation.
- En nettoyant des tissus en vinyle, l'utilisation de produits à action revitalisante ou protectrice n'est pas recommandée et doit être évitée.
- L'utilisation d'agents nettoyants quaternaires contenant de l'éther butylique de diéthylène glycol ou de l'alcool sur les surfaces inférieures du fauteuil et du repose-pieds risque de compromettre la lisibilité des étiquettes préimprimées. Si cela se produit, se reporter à "Étiquettes de produitRetour à la table des matièresÉtiquettes de produit" on page

Résumé des consignes de sécurité

ATTENTION (SUITE)

2-11 pour lire le texte original de l'étiquette.

- Il convient d'établir un programme d'entretien préventif pour tous les équipements. On jugera nécessaire d'augmenter la fréquence des entretiens préventifs en fonction des conditions d'utilisation du matériel. Pour des informations supplémentaires sur l'entretien, se reporter à la "Liste de vérification" on [page 2-10](#).
- Un entretien incorrect peut provoquer des blessures ou endommager le produit. Maintenir l'unité tel que décrit dans ce manuel. Utiliser uniquement les pièces et les procédures d'entretien approuvées par Stryker. L'utilisation de pièces et de procédures non approuvée pourrait entraîner des opérations imprévisibles et/ou des blessures et annulera la garantie du produit (voir "Garantie" on [page 2-30](#)).
- En utilisant les modèles Comfort-Flex 4855 et 4856, tenir les extrémités éloignées des points identifiés dans la figure 4, en raison de la présence de points de pincement éventuels pouvant entraîner des blessures mineures ou modérées.

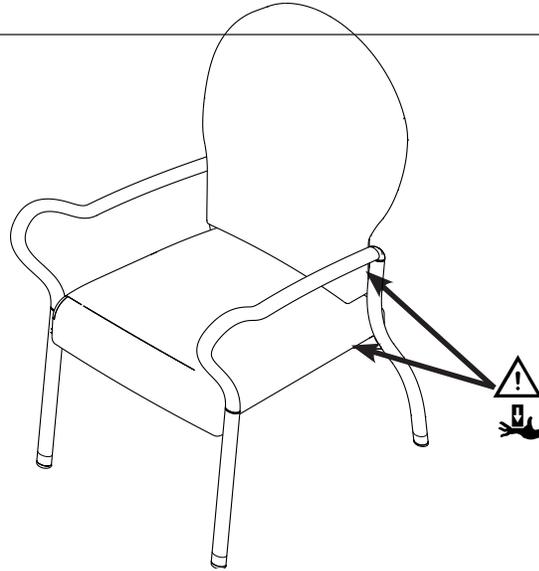


Figure 4 : Points de pincement Comfort-Flex

RANGEMENT DU REPOSE-PIEDS

AVERTISSEMENT

Ranger le repose-pieds sous le fauteuil quand il n'est pas utilisé pour éviter les risques de trébuchement.

Pour les modèles 4851, 4852, 4853, 4854, 4855 et 4856 uniquement, quand il n'est pas utilisé, ranger le repose-pieds latéralement sous l'avant du fauteuil conformément à la figure 5.

MISE EN GARDE

Pour ne pas endommager le capitonnage du repose-pieds, ne pas forcer le repose-pieds contre les composants du châssis du fauteuil (fauteuils Comfort-Flex uniquement).

Pour les modèles 4850 uniquement, quand il n'est pas utilisé, ranger le repose-pieds en le faisant pivoter sous le fauteuil depuis l'avant conformément à la figure 6.



Figure 5 : Rangement latéral du repose-pieds (comme illustré) - Modèles 4851, 4852, 4853, 4854, 4855 et 4856 uniquement



Figure 6 : Rangement pivoté du repose-pieds (comme illustré) - Modèle 4850 uniquement

Entretien préventif

L'entretien préventif doit être effectué au minimum une fois par an. Il convient d'établir un programme d'entretien préventif pour tous les équipements Stryker Medical. On jugera nécessaire d'augmenter la fréquence des entretiens préventifs en fonction des conditions d'utilisation du matériel.

Français

LISTE DE VÉRIFICATION

- _____ Toutes les fermetures sont solides et intactes
- _____ Tous les patins de pied sont solides et intacts pour ne pas endommager le sol
- _____ Tous les coussins de siège et les dossiers de fauteuil sont solides et intacts
- _____ Les deux bras sont bien fixés et intacts
- _____ Toutes les soudures (châssis métalliques) sont bien fixées et intactes
- _____ Absence de perforation ou de déchirure dans les bras du fauteuil, ensemble châssis du siège de fauteuil capitonné, dossier de fauteuil capitonné, panneau arrière de fauteuil capitonné ou ensemble repose-pieds capitonné
- _____ Tous les capuchons en plastique sont bien fixés et intacts (fauteuils sans bras uniquement)
- _____ Le mécanisme Comfort-Flex est fonctionnel et fonctionne sans problème (fauteuils Comfort-Flex uniquement)
- _____ Vérifier la lisibilité, l'adhérence et l'intégrité des étiquettes mentionnées dans les manuels d'utilisation et d'entretien.



MISE EN GARDE

- Il convient d'établir un programme d'entretien préventif pour tous les équipements. On jugera nécessaire d'augmenter la fréquence des entretiens préventifs en fonction des conditions d'utilisation du matériel.
- Un entretien incorrect peut provoquer des blessures ou endommager le produit. Maintenir l'unité tel que décrit dans ce manuel. Utiliser uniquement les pièces et les procédures d'entretien approuvées par Stryker. L'utilisation de pièces et de procédures non approuvées pourrait entraîner des opérations imprévisibles et/ou des blessures et annulera la garantie du produit (voir "Garantie" on [page 2-30](#)).

Numéro de série de l'unité :		

Date :

Vérification réalisée par : _____

Nettoyage

ENTRETIEN ET NETTOYAGE DU TISSU

AVERTISSEMENT

L'absence de nettoyage adéquat d'une surface contaminée augmente le risque d'exposition aux pathogènes à diffusion hémotogène.

L'utilisateur doit suivre ces instructions pour être sûr de bien nettoyer les tissus Stryker Medical (vinyle, sans PVC, sans PVC avec Agion®, Crypton®, Crypton® Green ou Agion® tissé) en toute sécurité. Le non respect de ces instructions peut endommager le matériel et perturber ses performances.

ATTENTION

- Utiliser un chiffon blanc et doux pour nettoyer les zones souillées ou tachées. Éviter d'utiliser des serviettes essuie-tout.
- Les produits nettoyants peuvent être nocifs à la peau et/ou aux yeux. Utiliser des gants de protection et des protections des yeux. Protéger la zone et le tissu environnants de l'exposition aux nettoyants. Ne pas inhaler ni ingérer les agents de nettoyage. Suivre toutes les mises en garde du fabricant du produit nettoyant.
- L'utilisation de certains agents peut nuire à l'aspect de la surface et à la durée de vie des tissus. Vérifier la compatibilité des produits nettoyants avec d'autres surfaces du mobilier, telles que les surfaces peintes ou vernies.
- Nettoyer toutes les taches sans attendre, car certaines taches deviennent permanentes si elles ne sont pas éliminées rapidement.
- Cette information ne constitue pas une garantie et ne dégage pas de la responsabilité d'utiliser correctement et en toute sécurité ces tissus et tous les agents de nettoyage.

Vinyle

Nettoyer toutes les taches le plus rapidement possible et utiliser les procédures de nettoyage suivantes pour obtenir des résultats optimaux.

ATTENTION

En nettoyant des tissus en vinyle, l'utilisation de produits à action revitalisante ou protectrice n'est pas recommandée et doit être évitée.

Protocole de nettoyage A (voir tableau [page 2-12](#)) :

- Éponger tout écoulement excessif avec un chiffon humide et propre. Nettoyer avec un mélange d'eau chaude et de 10 % de savon liquide. Rincer à l'eau claire et sécher.
- Pour les taches rebelles, utiliser une application directe de nettoyant liquide vendu dans le commerce à base de solvant et de butyle. Essuyer avec un chiffon propre. Rincer à l'eau claire et sécher.
- Si la tache persiste, utiliser un mélange 1:1 d'eau et d'alcool isopropyle. Rincer abondamment à l'eau puis sécher en tamponnant la surface avec un chiffon non pelucheux. Si elle persiste après six tentatives, la tache s'est imprégnée et ne peut sans doute plus être éliminée.
- Pour les taches plus rebelles ou difficiles, utiliser un mélange de 9:1 d'eau et d'eau de Javel (mélanger 10 % d'eau de Javel pour 90 % d'eau). Rincer à l'eau claire et sécher. Si la tache persiste, utiliser un chiffon propre saturé de produit de nettoyage dilué et frotter la tache d'un geste circulaire. Essuyer en tamponnant avec un autre chiffon propre. Répéter l'opération le cas échéant.

Protocole de nettoyage B (voir tableau [page 2-12](#)) :

- Éponger tout écoulement excessif avec un chiffon humide et propre. Nettoyer avec un mélange d'eau chaude et de 10 % de savon liquide. Rincer à l'eau claire et sécher.
- Pour les taches rebelles, appliquer une solution de produit nettoyant liquide et d'eau avec une brosse souple. Éliminer les résidus avec un chiffon humide et propre. Humidifier un chiffon blanc et propre avec une solution d'eau de Javel chlorée (10 % d'eau de Javel pour 90 % d'eau). Frotter délicatement. Rincer à l'aide d'un chiffon humide et propre pour éliminer la concentration d'eau de Javel.

[Retour à la table des matières](#)

Nettoyage

ENTRETIEN ET NETTOYAGE DU TISSU (SUITE)

- Si la tache persiste, laisser s'accumuler un mélange dilué de 1:10 d'eau et d'eau de Javel et sur la zone affectée, ou appliquer à l'aide d'un chiffon humide et propre pendant environ 30 minutes. Rincer à l'aide d'un chiffon humide et propre pour éliminer la concentration d'eau de Javel restante.

Protocoles de nettoyage recommandé pour le vinyle :

Respecter les instructions de nettoyage du protocole A ou du protocole B décrits [page 2-11](#) conformément aux motifs ci-dessous.

Motif	Protocole A	Protocole B
Abacus	X	
Aspen	X	
Avant		X
Banyan	X	
Bari	X	
Bistro		X
Bon Voyage	X	
Capreni	X	
Carlisle		X
Casablanca	X	
Checkmate	X	
Chroma		X
Cirque	X	
Dash	X	
Dodge Ball		X
Facet	X	
Geomet	X	
Juxy	X	
Laredo		X
Lava	X	
Martini	X	

Motif	Protocole A	Protocole B
Matrix		X
Natural World	X	
Oakwood		X
Olympus	X	
Oxford	X	
Petals		X
Prisma	X	
Raffia	X	
Rally		X
Rialto		X
Rivera	X	
Script	X	
Shantung	X	
Smile		X
Southampton		X
Tendrill		X
Tessuto	X	
Walk the Line	X	
Whitney	X	
Ybor	X	
Ziggy	X	

ENTRETIEN ET NETTOYAGE DU TISSU (SUITE)

Sans PVC et sans PVC avec Agion®

Nettoyer toutes les taches le plus rapidement possible et utiliser les procédures de nettoyage suivantes pour obtenir des résultats optimaux.

- Éponger tout écoulement excessif avec un chiffon humide et propre. Nettoyer avec un mélange d'eau chaude et de 10 % de savon liquide. Rincer à l'eau claire et sécher.
- Pour les taches rebelles, utiliser un mélange 1:1 d'eau et de produit nettoyant liquide vendu dans le commerce à base de solvant et de butyle. Rincer à l'eau claire. Essuyer avec un chiffon propre.
- Pour les taches plus rebelles ou difficiles, utiliser un mélange 5:1 d'eau et d'eau de Javel (mélanger 5 parts d'eau et 1 part d'eau de Javel). Rincer à l'eau claire et sécher. Ne jamais utiliser d'eau de Javel pure pour nettoyer et/ou désinfecter les produits sans PVC.

Remarque : Utiliser une brosse souple ou un chiffon propre saturé de produit de nettoyage. Toujours tester les méthodes de nettoyage sur une région non visible du mobilier.

Crypton® et Crypton Green®

Pour éviter l'encrassement global, il est recommandé de passer régulièrement l'aspirateur ou de broser légèrement le mobilier pour éliminer les impuretés, la poussière et la saleté. Enlever les taches en utilisant la mousse d'un agent de nettoyage à base d'eau tel qu'un détergent doux ou un shampoing d'ameublement sans solvant. Appliquer la mousse avec un chiffon doux ou une brosse d'un geste circulaire. Passer l'aspirateur quand la surface est sèche. Toujours tester préalablement une petite zone avant de poursuivre.

Éliminer toutes les impuretés et les écoulements le plus rapidement possible.

- Essuyer les écoulements avant qu'ils ne sèchent à l'aide d'un chiffon propre.
- Si la tache a séché, broser ou gratter légèrement le résidu et essuyer à l'aide d'une serviette humide.
- Si la tache persiste, nettoyer le tissu avec un mélange d'eau et de détergent enzymatique (mélanger 5 parts d'eau pour 1 part de détergent enzymatique). Frotter la zone pendant une minute en utilisant une brosse en nylon souple. Rincer à l'eau claire en ne laissant pas de résidus. Sécher avec un chiffon propre.
- Répéter le cas échéant.

Ne pas utiliser de produits nettoyants à base de solvants car ils risquent d'endommager le tissu.

Agion® tissé

On peut utiliser des agents de nettoyage à base d'eau et de la mousse de nettoyage Agion® tissé. Des solvants doux sans eau peuvent également être utilisés pour nettoyer. Un nettoyage par un service professionnel est recommandé.

- Pour nettoyer facilement les souillures récentes, la plupart des taches peuvent être essuyées à l'aide d'un chiffon propre.
- Pour les taches rebelles, nettoyer avec un mélange d'eau chaude et de 10 % de savon liquide. Appliquer une solution de nettoyage diluée sur un chiffon propre ou une brosse souple. Humidifier un chiffon propre à l'eau claire et reprendre la tache pour l'essuyer et rincer. Laisser sécher à l'air.
- Pour les taches plus rebelles ou difficiles, utiliser un mélange d'eau et de produit nettoyant doux à base de solvant. Rincer à l'eau claire. Essuyer avec un chiffon propre.
- Si la tache persiste, utiliser un mélange 1:5 d'eau et de solution d'eau de Javel (mélanger 5 parts d'eau pour 1 part d'eau de Javel) avec une solution contenant au maximum 20 % d'eau de Javel. Tamponner la tache à l'aide d'un chiffon propre saturé dans le mélange d'eau de Javel dilué. Rincer la région de la tache avec un chiffon humide et propre et laisser sécher. Les solutions d'eau de Javel feraient pâlir le tissu si elles ne sont pas complètement éliminées. Ne jamais utiliser d'eau de Javel pure pour nettoyer ces tissus.

Nettoyage

ENTRETIEN ET NETTOYAGE DU TISSU (SUITE)

Remarque : Utiliser une brosse souple ou un chiffon propre saturé de produit de nettoyage. Tester les méthodes de nettoyage sur une région non visible du mobilier. Si la tache persiste, elle s'est probablement incrustée. Même si ces tissus résistent à la plupart des taches, certains agents tels que l'encre peuvent produire une tache permanente. Éliminer toutes les taches le plus rapidement possible.

Français

NETTOYAGE DU CHÂSSIS ET DES BRAS

Les produits nettoyants pour le châssis et les bras sont les suivants :

- ammoniums quaternaires (substance active : chlorure d'ammonium)
- nettoyants phénoliques (substance active : o-phénylphénol)
- nettoyants à base d'alcool (teneur maximum en alcool de 70 %)
- Solution d'eau de Javel (une part d'eau de Javel pour 100 parts d'eau).

L'eau de Javel chlorée est recommandée comme nettoyant (moins d'une part d'eau de Javel pour 100 parts d'eau). Par exemple, une solution d'eau de Javel à 6 % diluée dans 165 millilitres de solution d'eau de Javel par litre d'eau, ou 20 onces de solution d'eau de Javel par gallon d'eau. Rincer la solution de la surface du produit pour éliminer toute trace d'eau de Javel. Si d'autres agents de nettoyage de classe hospitalière sont utilisés, suivre les instructions fournies par le fabricant de la solution de nettoyage. Ne pas laisser de solutions de nettoyage ou d'autres fluides s'accumuler sur l'unité. Essuyer la surface de l'unité avec un linge doux et sec pour retirer toute trace d'humidité.



ATTENTION

L'utilisation d'agents nettoyants quaternaires contenant de l'éther butylique de diéthylène glycol ou de l'alcool sur les surfaces inférieures du fauteuil et du repose-pieds risque de compromettre la lisibilité des étiquettes préimprimées. Si cela se produit, se reporter à "Étiquettes de produit" Retour à la table des matières "Étiquettes de produit" on page 2-11 pour lire le texte original de l'étiquette.

Liste de référence rapide des pièces de rechange

Tous les accessoires et les pièces indiqués sur cette [page](#) sont actuellement disponibles à la vente. Certaines des pièces indiquées sur les vues éclatées de ce manuel peuvent ne pas être disponibles à la vente individuellement. L'utilisateur doit communiquer avec le service à la clientèle de Stryker au 1-800-327-0770 (États-Unis) pour connaître la disponibilité et les prix.

Nom de la pièce	Référence
Trousse de coussin dorsal, dossier bas	4850-700-001
Trousse de coussin dorsal, dossier haut	4853-700-001
Trousse de coussin dorsal, Comfort-Flex	4856-700-001
Patin, noir (modules de couleur A, D et E uniquement)	4850-100-127
Patin, pierre (modules de couleur B et C uniquement)	4850-100-128
Capuchon plastique, châtaigne (fauteuil sans bras : module de couleur A uniquement)	4850-100-115
Capuchon plastique, blanc (fauteuil sans bras : module de couleur B uniquement)	4850-100-117
Capuchon plastique, nickel satiné (fauteuil sans bras : module de couleur C uniquement)	4850-100-116
Capuchon plastique, orange/marron (fauteuil sans bras : module de couleur D uniquement)	4850-100-118
Capuchon plastique, noir (fauteuil sans bras : module de couleur E uniquement)	4850-100-114
Ensemble siège en mousse, capitonné (fauteuil sans bras uniquement)	4850-020-100
Ensemble siège en mousse, capitonné (fauteuils avec bras uniquement)	4853-020-100

Français

Information relative au service

REPLACEMENT DES PATINS DE PIEDS (TOUS LES MODÈLES)

Outils requis :

- Marteau
- Tournevis à lame plate

Procédure :

1. Mettre le fauteuil ou le repose-pieds à l'envers de façon à lever ses pieds du sol.

Remarque : Placer une feuille de papier ou une surface équivalente sur le sol pour ne pas abîmer le tissu du fauteuil ou du repose-pieds.

2. À l'aide d'un tournevis à lame plate ou d'un marteau, détacher soigneusement le patin endommagé (A) du pied (B) conformément à la figure 7 (pied de repose-pieds) ou de la figure 8 (pied de fauteuil). Jeter le patin.
3. À l'aide d'un marteau, monter le nouveau patin en l'enfonçant dans le pied du fauteuil ou du repose-pieds de façon à le faire affleurer avec l'extrémité du pied.

Remarque : Le patin de pied est conique. Avant l'installation, s'assurer que le côté effilé est positionné vers l'intérieur et le milieu du fauteuil ou du repose-pieds.

4. Remettre le fauteuil ou le repose-pieds à l'endroit.
5. Vérifier le bon fonctionnement de l'unité avant de la remettre en service.

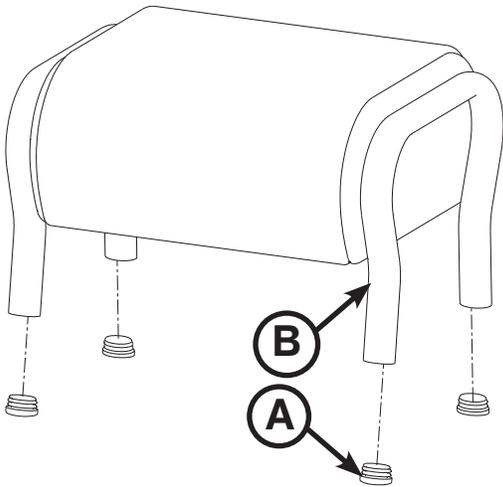


Figure 7 : Remplacement des patins de pieds du repose-pieds

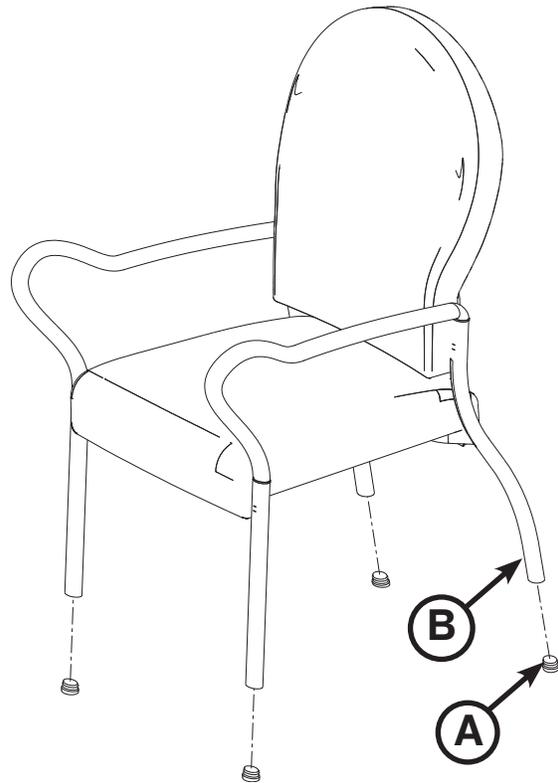


Figure 8 : Remplacement des patins de pieds du fauteuil

Information relative au service

REPLACEMENT DU DOSSIER DE FAUTEUIL (MODÈLES 4850, 4851, 4852, 4853 ET 4854)

Pour les modèles 4850, 4851 et 4852, installer la trousse (réf. 4850-700-001)

Pour les modèles 4853 et 4854, installer la trousse (réf. 4853-700-001)

Outils requis :

- Tournevis à large lame plate
- Tournevis cruciforme n° 3

Procédure :

1. À l'aide d'un tournevis à lame plate no 2, détacher soigneusement le panneau arrière (A) du coussin dorsal (B) (Figure 9).

Remarque : Pour les modèles 4850, 4851 et 4852, sept rivets à pression (C) maintiennent le panneau arrière au coussin dorsal. Pour les modèles 4853 et 4854, neuf rivets à pression (C) maintiennent le panneau arrière au coussin dorsal (Figure 9).

2. À l'aide d'un tournevis cruciforme n° 3, retirer les quatre vis (D) qui maintiennent le coussin dorsal au châssis du fauteuil (E) et retirer le coussin du dossier (Figure 9). Jeter le coussin dorsal, le panneau arrière et les vis.
3. À l'aide d'un tournevis cruciforme n° 3, monter les quatre vis fournies pour fixer le nouveau coussin dorsal au châssis du fauteuil. Commencer par enfiler chaque vis avant de serrer toutes les quatre.
4. Installer le nouveau panneau arrière dans le nouveau coussin dorsal en alignant les sept rivets à pression avec les écrous encastrés du coussin dorsal. Enfoncer soigneusement chaque rivet à pression après les avoir localisés de l'extérieur à travers le tissu.

Remarque : S'assurer que chaque rivet à pression est bien positionné et que le panneau arrière est en contact étroit avec le coussin.

ATTENTION

Pour éviter le risque d'endommagement par l'équipement du nouveau panneau arrière, vérifier que chaque rivet à pression est aligné avec son écrou encastré avant l'installation.

5. Vérifier le bon fonctionnement de l'unité avant de la remettre en service.

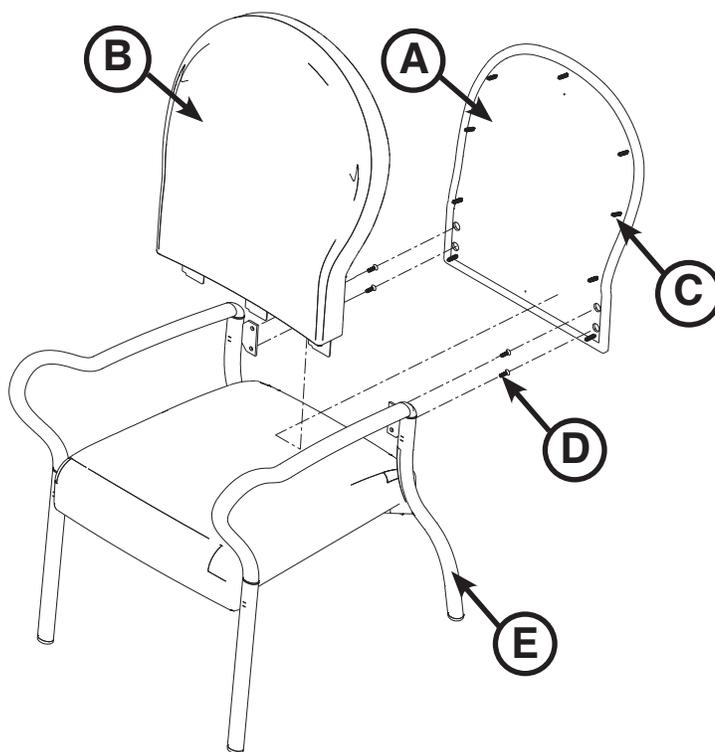


Figure 9 : Remplacement du dossier (modèle 4853 illustré)

REPLACEMENT DU DOSSIER DE FAUTEUIL (MODÈLES 4855 ET 4856)

Pour les modèles 4855 et 4856, installer la trousse (réf. 4856-700-001)

Outils requis :

- Tournevis à lame plate
- Tournevis cruciforme n° 3

Procédure :

1. À l'aide d'un tournevis à lame plate no 2, détacher soigneusement le panneau arrière (A) du coussin de dossier (B) (Figure 10).

Remarque : Onze rivets à pression (C) maintiennent le panneau arrière au coussin du dossier (Figure 10).

2. À l'aide d'un tournevis cruciforme n° 3, retirer les six vis (D) qui maintiennent le coussin dorsal au châssis du fauteuil (E) et retirer le coussin dorsal (Figure 10). Jeter le coussin dorsal, le panneau arrière et les vis.
3. À l'aide d'un tournevis cruciforme n° 3, monter les six vis fournies qui maintiennent le nouveau coussin dorsal au châssis du fauteuil. Commencer par enfiler chaque vis avant de serrer toutes les six.
4. Installer le nouveau panneau arrière dans le nouveau coussin dorsal en alignant les onze rivets à pression avec les écrous encastrés du coussin dorsal. Enfoncer soigneusement chaque rivet à pression après les avoir localisés de l'extérieur à travers le tissu.

Remarque : S'assurer que chaque rivet à pression est bien positionné et que le panneau arrière est en contact étroit avec le coussin.

ATTENTION

Pour éviter le risque d'endommagement de l'équipement au nouveau panneau arrière, vérifier que chaque rivet à pression est aligné avec son écrou encastré avant l'installation.

5. Vérifier le bon fonctionnement de l'unité avant de la remettre en service.

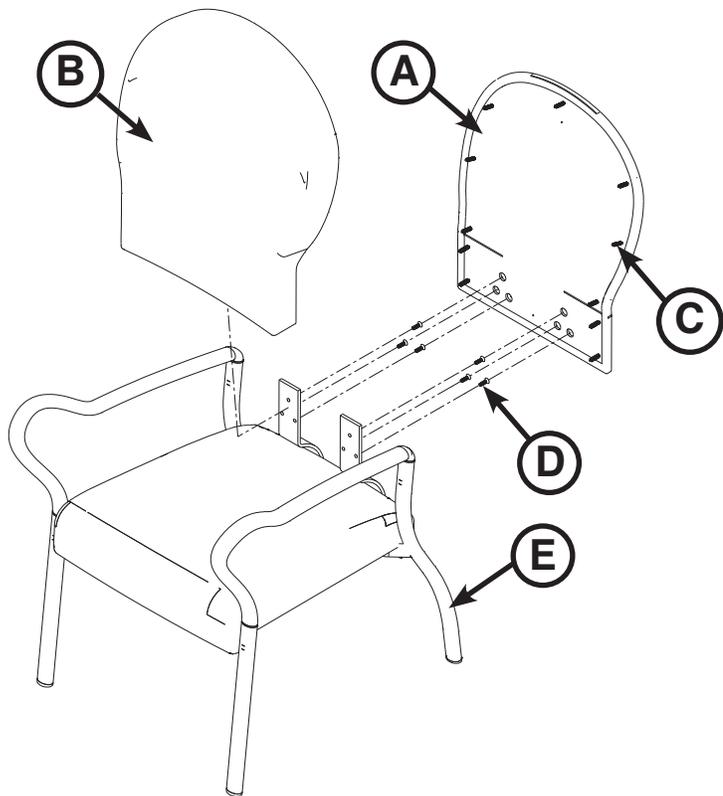


Figure 10 : Remplacement du dossier (modèle 4855 illustré)

REPLACEMENT DU COUSSIN DE SIÈGE (TOUS LES MODÈLES)

Outils requis :

- Tournevis cruciforme n° 3

Procédure :

1. Mettre le fauteuil à l'envers de façon à lever ses pieds du sol.

Remarque : Placer une feuille de papier ou une surface équivalente sur le sol pour ne pas abîmer le tissu du fauteuil.

2. À l'aide d'un tournevis cruciforme n° 3, retirer les quatre vis (A) qui maintiennent le coussin du siège (B) au châssis du fauteuil (C), et retirer le coussin (Figure 11). Jeter le coussin et les vis.
3. À l'aide d'un tournevis cruciforme n° 3, monter les quatre vis fournies qui maintiennent le nouveau coussin de siège au châssis du fauteuil. Commencer par enfiler chaque vis avant de serrer toutes les quatre.
4. Remettre le fauteuil à l'endroit.
5. Vérifier le bon fonctionnement de l'unité avant de la remettre en service.


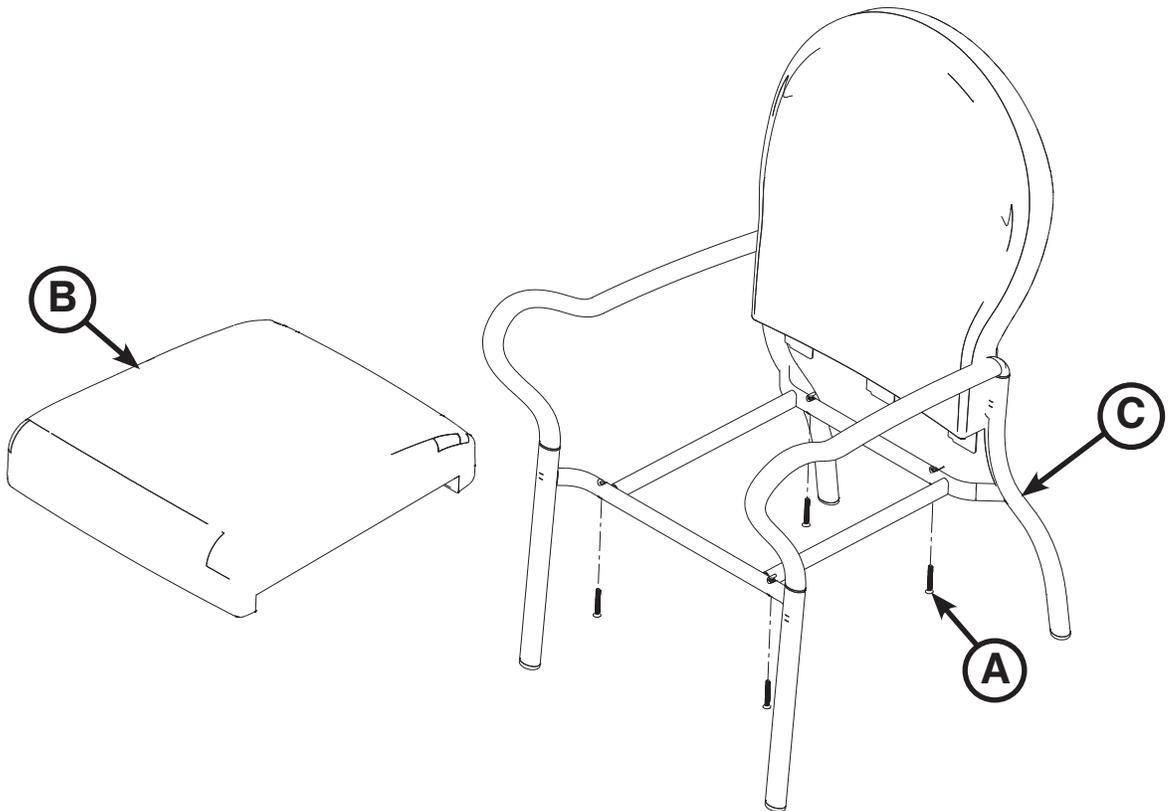


Figure 11 : Remplacement du coussin du siège

Modèle 4850 : fauteuil de patient, dossier bas, sans bras

4850-010-000 Rév. D (Référence uniquement)

Français

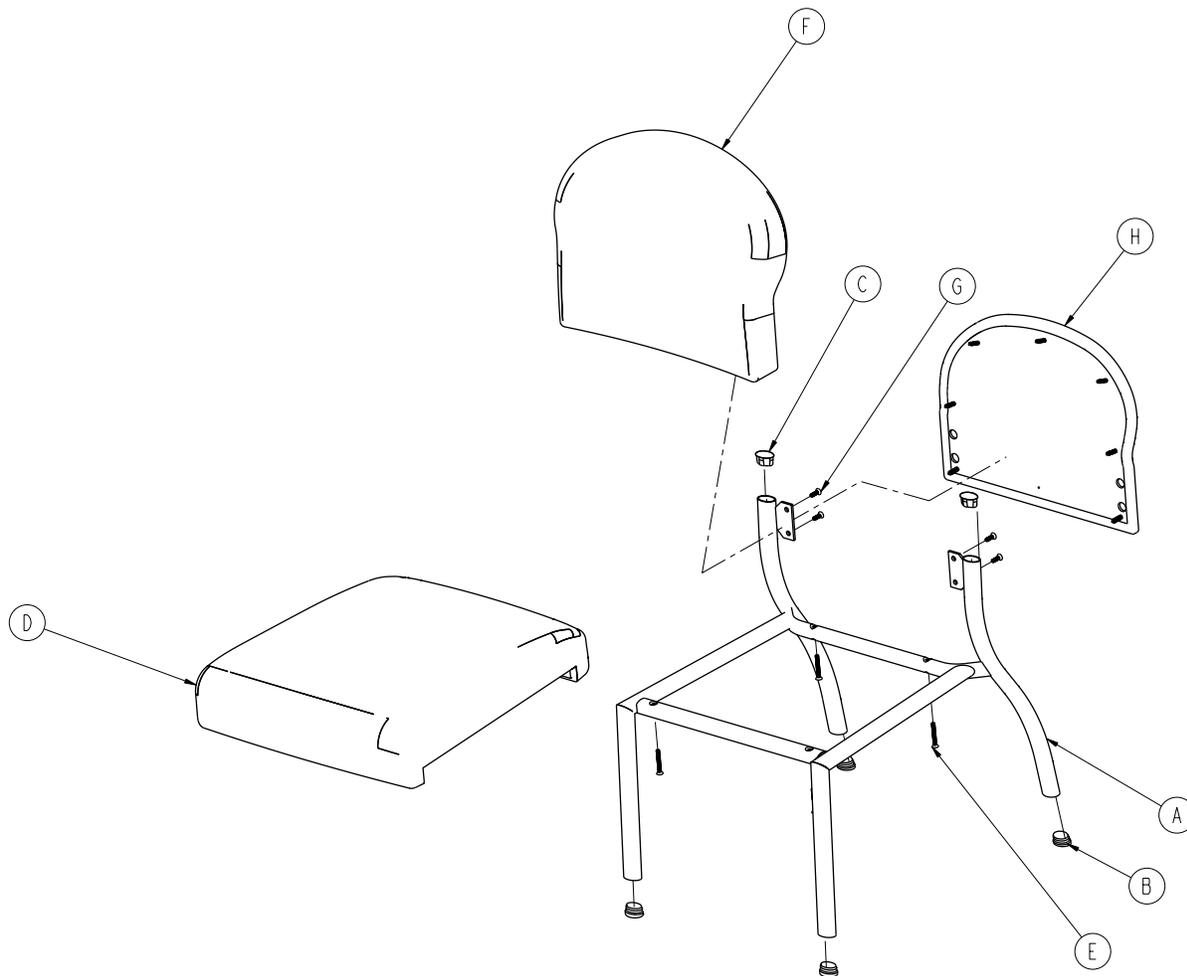

Article	Description	Qté	4850-010-001 Châtaigne (A)	4850-010-002 Blanc (B)	4850-010-003 Nickel satiné (C)	4850-010-004 Orange/ Marron (D)	4850-010-005 Noir (E)
A	Ensemble châs- sis, sans bras	1	4850-110-012*	4850-110-014*	4850-110-013*	4850-110-015*	4850-110-011*
B	Patin	4	4850-100-127	4850-100-128	4850-100-128	4850-100-127	4850-100-127
C	Capuchon en plastique	2	4850-100-115	4850-100-117	4850-100-116	4850-100-118	4850-100-114
D	Ensemble siège en mousse, capitonné	1	4850-020-100	4850-020-100	4850-020-100	4850-020-100	4850-020-100
E	Vis d'assemblage à six pans creux	4	0004-001-002	0004-001-002	0004-001-002	0004-001-002	0004-001-002
F	Dossier, dossier bas, capitonné	1	4851-010-100**	4851-010-100**	4851-010-100**	4851-010-100**	4851-010-100**
G	Vis d'assemblage à six pans creux	4	0004-001-003**	0004-001-003**	0004-001-003**	0004-001-003**	0004-001-003**
H	Panneau ar- rière, dossier bas, capitonné	1	4851-011-100**	4851-011-100**	4851-011-100**	4851-011-100**	4851-011-100**


* Indiqué à titre de référence uniquement. Ces ensembles ou pièces ne sont pas vendus séparément.

** Pour les trousse, voir la "Liste de référence rapide des pièces de rechange" on [page 2-15](#).

[Retour à la table des matières](#)

Modèle 4851 : fauteuil de patient, dossier bas, siège bas

4851-010-000 Rév. D (Référence uniquement)

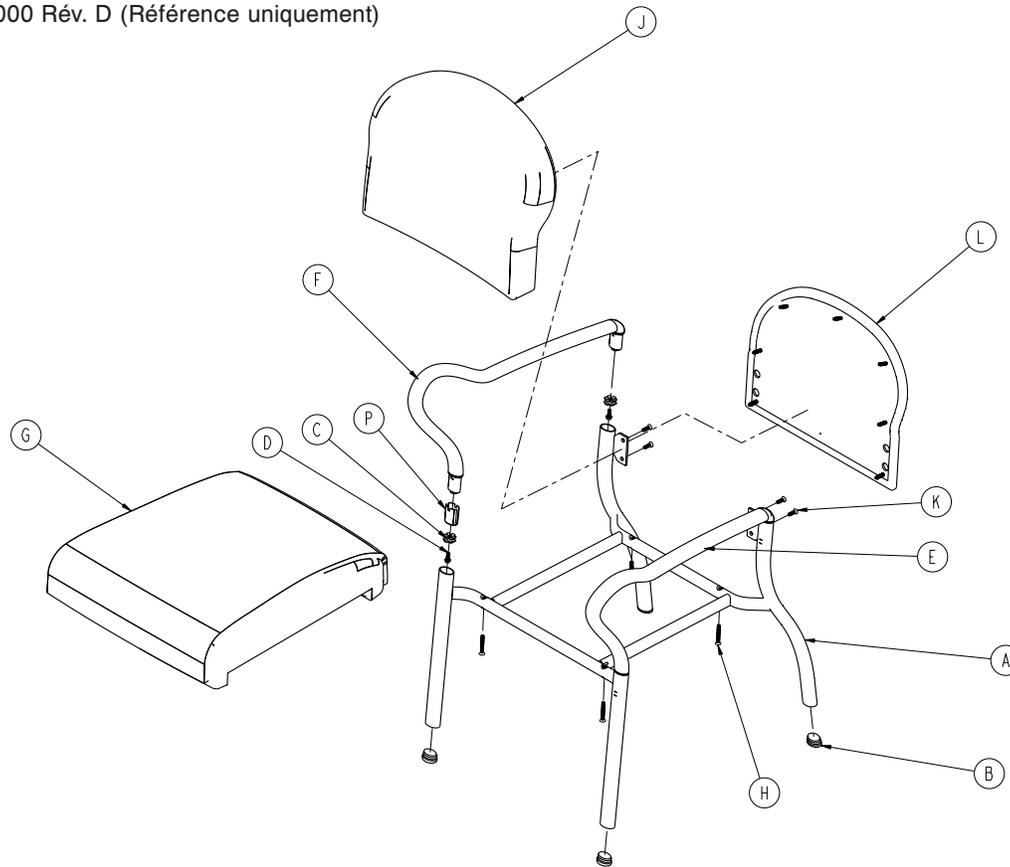

Français

Article	Description	Qté	4851-010-001 Châtaigne (A)	4851-010-002 Blanc (B)	4851-010-003 Nickel satiné (C)	4851-010-004 Orange/ Marron (D)	4851-010-005 Noir (E)
A	Ensemble châ- sis, siège bas	1	4853-110-012*	4853-110-014*	4853-110-013*	4853-110-015*	4853-110-011*
B	Patin	4	4850-100-127	4850-100-128	4850-100-128	4850-100-127	4850-100-127
C	Tube de raccordement	4	0018-040-000*	0018-040-000*	0018-040-000*	0018-040-000*	0018-040-000*
D	Vis d'assemblage à tête hexagonale	4	0003-149-000*	0003-149-000*	0003-149-000*	0003-149-000*	0003-149-000*
E	Bras, gauche	1	4851-200-031*	4851-200-032*	4851-200-032*	4851-200-031*	4851-200-031*
F	Bras, droit	1	4851-200-041*	4851-200-042*	4851-200-042*	4851-200-041*	4851-200-041*
G	Ensemble siège en mousse, capitonné	1	4853-020-100	4853-020-100	4853-020-100	4853-020-100	4853-020-100
H	Vis d'assemblage à six pans creux	4	0004-001-002	0004-001-002	0004-001-002	0004-001-002	0004-001-002
J	Dossier, dossier bas, capitonné	1	4851-010-100**	4851-010-100**	4851-010-100**	4851-010-100**	4851-010-100**
K	Vis d'assemblage à six pans creux	4	0004-001-003**	0004-001-003**	0004-001-003**	0004-001-003**	0004-001-003**
L	Panneau ar- rière, dossier bas, capitonné	1	4851-011-100**	4851-011-100**	4851-011-100**	4851-011-100**	4851-011-100**
P	Machon, Appui Bras	2	4851-200-001	4851-200-001	4851-200-001	4851-200-001	4851-200-001


* Indiqué à titre de référence uniquement. Ces ensembles ou pièces ne sont pas vendus séparément.

** Pour les trousse, voir la "Liste de référence rapide des pièces de rechange" on [page 2-15](#).

[Retour à la table des matières](#)

Modèle 4852 : fauteuil de patient, dossier bas 56 cm (22 po), siège haut

4852-010-000 Rév. C (Référence uniquement)

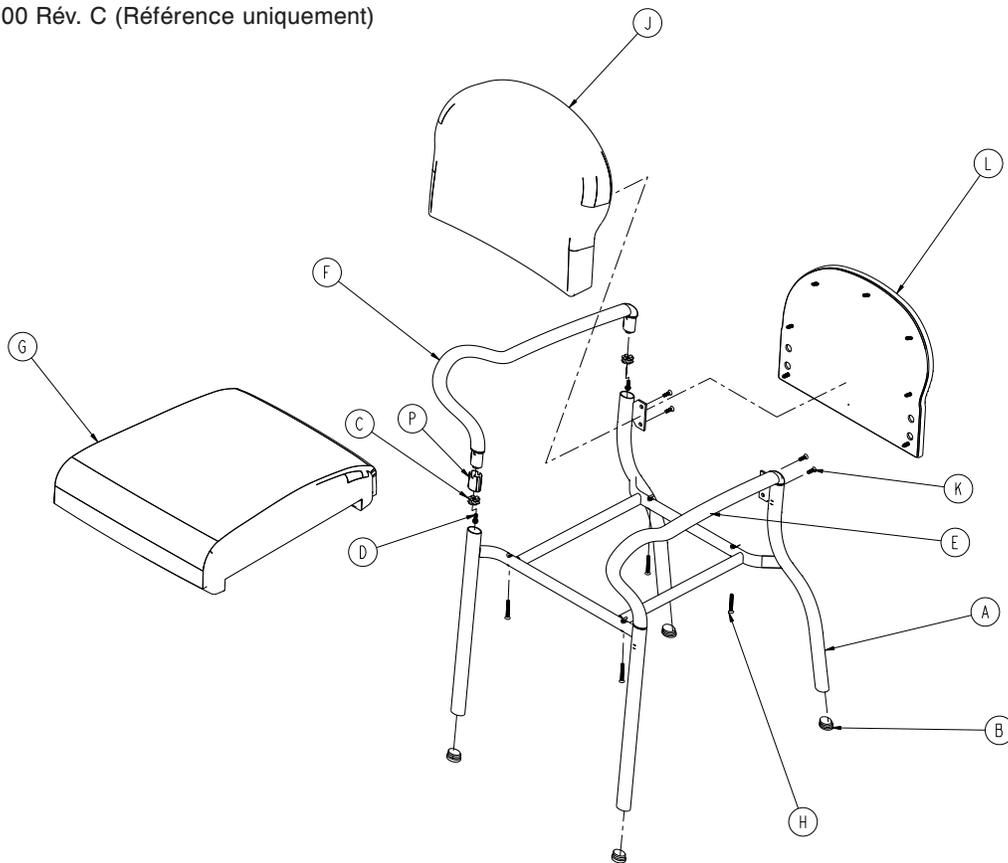

Article	Description	Qté	4852-010-001 Châtaigne (A)	4852-010-002 Blanc (B)	4852-010-003 Nickel satiné (C)	4852-010-004 Orange/ Marron (D)	4852-010-005 Noir (E)
A	Ensemble châssis, siège haut	1	4854-110-012*	4854-110-014*	4854-110-013*	4854-110-015*	4854-110-011*
B	Patin	4	4850-100-127	4850-100-128	4850-100-128	4850-100-127	4850-100-127
C	Tube de raccordement	4	0018-040-000*	0018-040-000*	0018-040-000*	0018-040-000*	0018-040-000*
D	Vis d'assemblage à tête hexagonale	4	0003-149-000*	0003-149-000*	0003-149-000*	0003-149-000*	0003-149-000*
E	Bras, gauche	1	4851-200-031*	4851-200-032*	4851-200-032*	4851-200-031*	4851-200-031*
F	Bras, droit	1	4851-200-041*	4851-200-042*	4851-200-042*	4851-200-041*	4851-200-041*
G	Ensemble siège en mousse, capitonné	1	4853-020-100	4853-020-100	4853-020-100	4853-020-100	4853-020-100
H	Vis d'assemblage à six pans creux	4	0004-001-002	0004-001-002	0004-001-002	0004-001-002	0004-001-002
J	Dossier, dossier bas, capitonné	1	4851-010-100**	4851-010-100**	4851-010-100**	4851-010-100**	4851-010-100**
K	Vis d'assemblage à six pans creux	4	0004-001-003**	0004-001-003**	0004-001-003**	0004-001-003**	0004-001-003**
L	Panneau arrière, dossier bas, capitonné	1	4851-011-100**	4851-011-100**	4851-011-100**	4851-011-100**	4851-011-100**
P	Machon, Appui Bras	2	4851-200-001	4851-200-001	4851-200-001	4851-200-001	4851-200-001


* Indiqué à titre de référence uniquement. Ces ensembles ou pièces ne sont pas vendus séparément.

** Pour les trousse, voir la "Liste de référence rapide des pièces de rechange" on [page 2-15](#).

[Retour à la table des matières](#)

Modèle 4853 : fauteuil de patient, dossier haut, siège bas

4853-010-000 Rév. D (Référence uniquement)

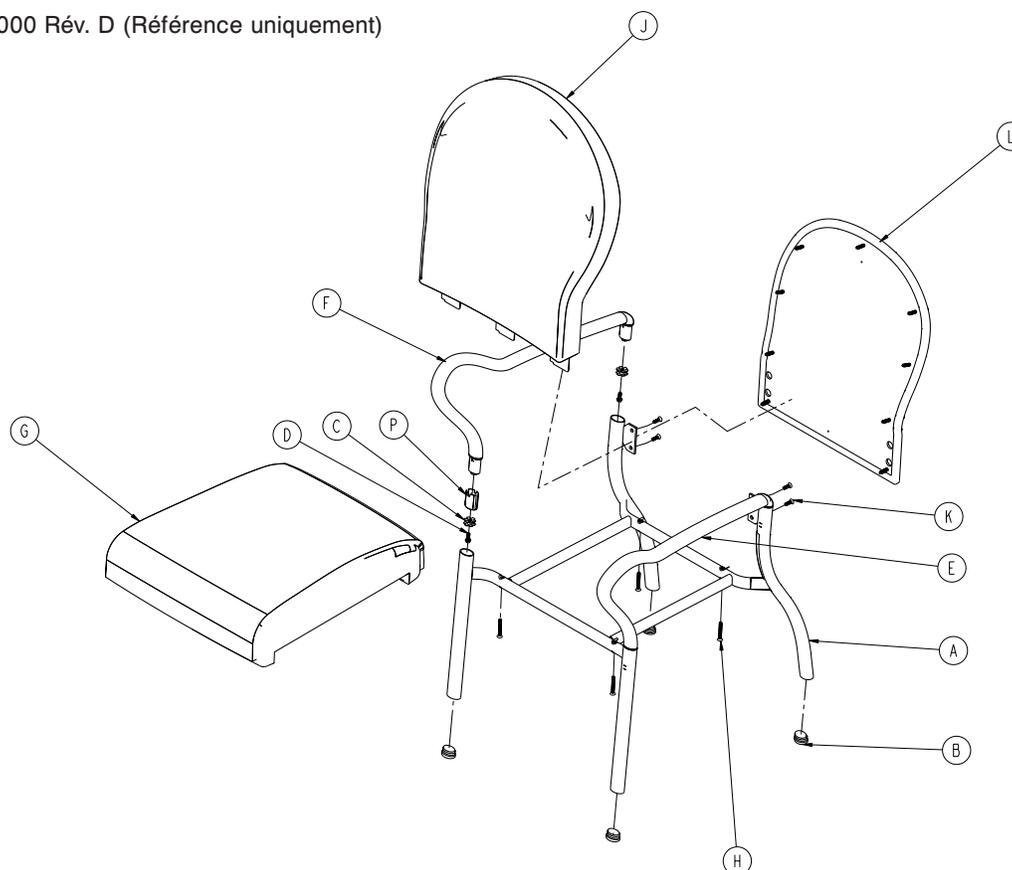

Français

Article	Description	Qté	4853-010-001 Châtaigne (A)	4853-010-002 Blanc (B)	4853-010-003 Nickel satiné (C)	4853-010-004 Orange/ Marron (D)	4853-010-005 Noir (E)
A	Ensemble châs- sis, siège bas	1	4853-110-012*	4853-110-014*	4853-110-013*	4853-110-015*	4853-110-011*
B	Patin	4	4850-100-127	4850-100-128	4850-100-128	4850-100-127	4850-100-127
C	Tube de raccordement	4	0018-040-000*	0018-040-000*	0018-040-000*	0018-040-000*	0018-040-000*
D	Vis d'assemblage à tête hexagonale	4	0003-149-000*	0003-149-000*	0003-149-000*	0003-149-000*	0003-149-000*
E	Bras, gauche	1	4851-200-031*	4851-200-032*	4851-200-032*	4851-200-031*	4851-200-031*
F	Bras, droit	1	4851-200-041*	4851-200-042*	4851-200-042*	4851-200-041*	4851-200-041*
G	Ensemble siège en mousse, capitonné	1	4853-020-100	4853-020-100	4853-020-100	4853-020-100	4853-020-100
H	Vis d'assemblage à six pans creux	4	0004-001-002	0004-001-002	0004-001-002	0004-001-002	0004-001-002
J	Dossier, dossier haut, capitonné	1	4853-010-100**	4853-010-100**	4853-010-100**	4853-010-100**	4853-010-100**
K	Vis d'assemblage à six pans creux	4	0004-001-003**	0004-001-003**	0004-001-003**	0004-001-003**	0004-001-003**
L	Panneau ar- rière, dossier haut, capitonné	1	4853-011-100**	4853-011-100**	4853-011-100**	4853-011-100**	4853-011-100**
P	Machon, Appui Bras	2	4851-200-001	4851-200-001	4851-200-001	4851-200-001	4851-200-001


* Indiqué à titre de référence uniquement. Ces ensembles ou pièces ne sont pas vendus séparément.

** Pour les trousse, voir la "Liste de référence rapide des pièces de rechange" on [page 2-15](#).

[Retour à la table des matières](#)

Modèle 4854 : fauteuil de patient, dossier haut 56 cm (22 po), siège haut

4854-010-000 Rév. C (Référence uniquement)

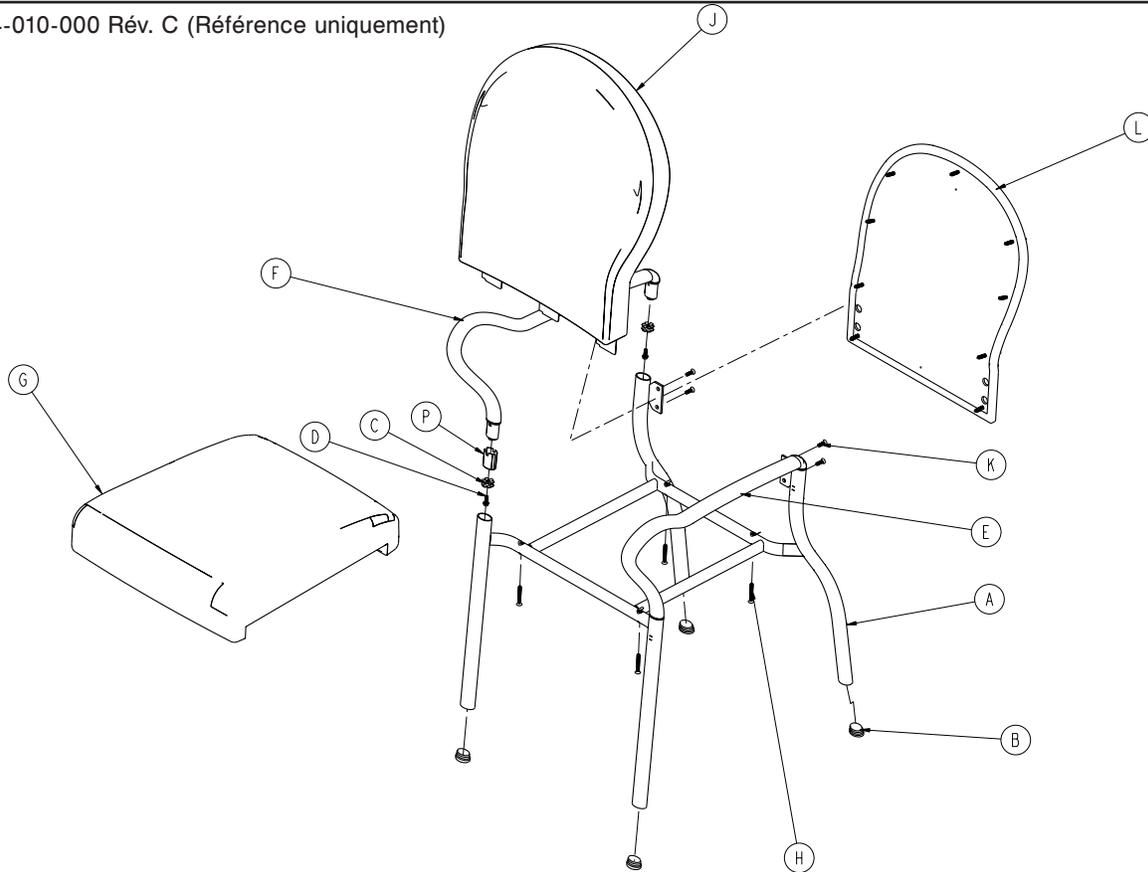

Article	Description	Qté	4854-010-001 Châtaigne (A)	4854-010-002 Blanc (B)	4854-010-003 Nickel satiné (C)	4854-010-004 Orange/ Marron (D)	4854-010-005 Noir (E)
A	Ensemble châs- sis, siège haut	1	4854-110-012*	4854-110-014*	4854-110-013*	4854-110-015*	4854-110-011*
B	Patin	4	4850-100-127	4850-100-128	4850-100-128	4850-100-127	4850-100-127
C	Tube de raccordement	4	0018-040-000*	0018-040-000*	0018-040-000*	0018-040-000*	0018-040-000*
D	Vis d'assemblage à tête hexagonale	4	0003-149-000*	0003-149-000*	0003-149-000*	0003-149-000*	0003-149-000*
E	Bras, gauche	1	4851-200-031*	4851-200-032*	4851-200-032*	4851-200-031*	4851-200-031*
F	Bras, droit	1	4851-200-041*	4851-200-042*	4851-200-042*	4851-200-041*	4851-200-041*
G	Ensemble siège en mousse, capitonné	1	4853-020-100	4853-020-100	4853-020-100	4853-020-100	4853-020-100
H	Vis d'assemblage à six pans creux	4	0004-001-002	0004-001-002	0004-001-002	0004-001-002	0004-001-002
J	Dossier, dossier haut, capitonné	1	4853-010-100**	4853-010-100**	4853-010-100**	4853-010-100**	4853-010-100**
K	Vis d'assemblage à six pans creux	4	0004-001-003**	0004-001-003**	0004-001-003**	0004-001-003**	0004-001-003**
L	Panneau arrière, dossier haut, capitoné	1	4853-011-100**	4853-011-100**	4853-011-100**	4853-011-100**	4853-011-100**
P	Machon, Appui Bras	2	4851-200-001	4851-200-001	4851-200-001	4851-200-001	4851-200-001


* Indiqué à titre de référence uniquement. Ces ensembles ou pièces ne sont pas vendus séparément.

** Pour les trousse, voir la "Liste de référence rapide des pièces de rechange" on [page 2-15](#).

[Retour à la table des matières](#)

Modèle 4855 : fauteuil de patient, Comfort-Flex, siège bas

4855-010-000 Rév F (Référence uniquement)

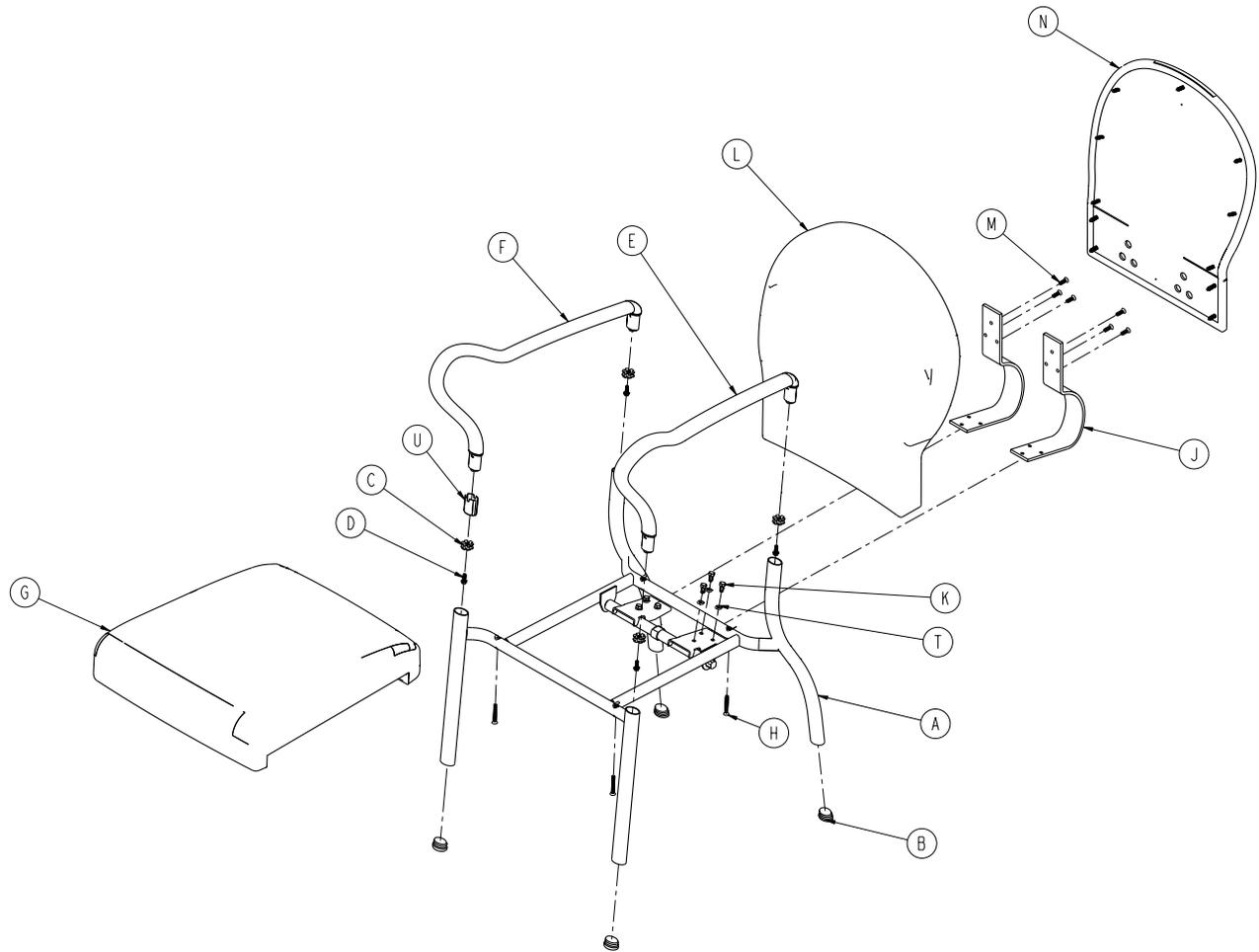

Français

[Retour à la table des matières](#)

Modèle 4855 : fauteuil de patient, Comfort-Flex, siège bas

Français

Article	Description	Qté	4855-010-001 Châtaigne (A)	4855-010-002 Blanc (B)	4855-010-003 Nickel satiné (C)	4855-010-004 Orange/ Marron (D)	4855-010-005 Noir (E)
A	Ensemble châ- sis, siège bas, dossier souple	1	4855-110-012*	4855-110-014*	4855-110-013*	4855-110-015*	4855-110-011*
B	Patin	4	4850-100-127	4850-100-128	4850-100-128	4850-100-127	4850-100-127
C	Tube de raccordement	4	0018-040-000*	0018-040-000*	0018-040-000*	0018-040-000*	0018-040-000*
D	Vis d'assemblage à tête hexagonale	4	0003-149-000*	0003-149-000*	0003-149-000*	0003-149-000*	0003-149-000*
E	Bras, gauche	1	4851-200-031*	4851-200-032*	4851-200-032*	4851-200-031*	4851-200-031*
F	Bras, droit	1	4851-200-041*	4851-200-042*	4851-200-042*	4851-200-041*	4851-200-041*
G	Ensemble siège en mousse, capitoné	1	4853-020-100	4853-020-100	4853-020-100	4853-020-100	4853-020-100
H	Vis d'assemblage à six pans creux	4	0004-001-002	0004-001-002	0004-001-002	0004-001-002	0004-001-002
J	Support de barre en J	2	4855-100-135	4855-100-137	4855-100-136	4855-100-138	4855-100-134
K	Vis d'assemblage à tête hexagonale	6	0004-001-004	0004-001-004	0004-001-004	0004-001-004	0004-001-004
L	Dossier, dossier souple, capitonné	1	4855-010-100**	4855-010-100**	4855-010-100**	4855-010-100**	4855-010-100**
M	Vis d'assemblage à six pans creux	6	0004-001-003**	0004-001-003**	0004-001-003**	0004-001-003**	0004-001-003**
N	Dossier, dossier souple, capitonné	1	4855-011-100**	4855-011-100**	4855-011-100**	4855-011-100**	4855-011-100**
T	Rondelle de blocage	6	0012-001-001	0012-001-001	0012-001-001	0012-001-001	0012-001-001
U	Machon, Appui Bras	2	4851-200-001	4851-200-001	4851-200-001	4851-200-001	4851-200-001


* Indiqué à titre de référence uniquement. Ces ensembles ou pièces ne sont pas vendus séparément.

** Pour les trousse, voir la "Liste de référence rapide des pièces de rechange" on [page 2-15](#).

Modèle 4856 : fauteuil de patient, Comfort-Flex 56 cm (22 po), siège haut

4856-010-000 Rév. E (Référence uniquement)

Français

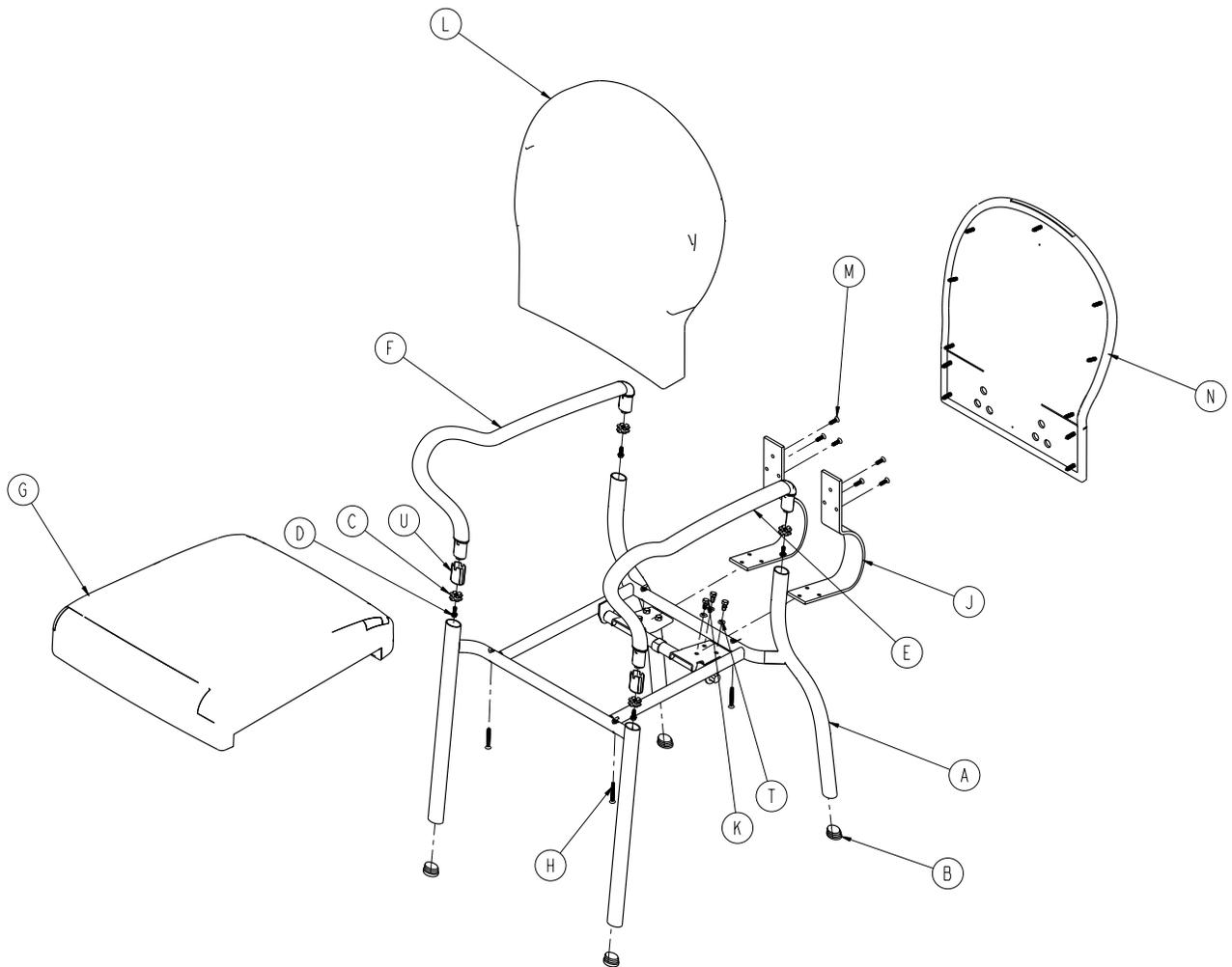

[Retour à la table des matières](#)

Modèle 4856 : fauteuil de patient, Comfort-Flex 56 cm (22 po), siège haut

Français

Article	Description	Qté	4856-010-001 Châtaigne (A)	4856-010-002 Blanc (B)	4856-010-003 Nickel satiné (C)	4856-010-004 Orange/ Marron (D)	4856-010-005 Noir (E)
A	Ensemble châ- sis, siège haut, dossier souple	1	4856-110-012*	4856-110-014*	4856-110-013*	4856-110-015*	4856-110-011
B	Patin	4	4850-100-127	4850-100-128	4850-100-128	4850-100-127	4850-100-127
C	Tube de raccordement	4	0018-040-000*	0018-040-000*	0018-040-000*	0018-040-000*	0018-040-000*
D	Vis d'assemblage à tête hexagonale	4	0003-149-000*	0003-149-000*	0003-149-000*	0003-149-000*	0003-149-000*
E	Bras, gauche	1	4851-200-031*	4851-200-032*	4851-200-032*	4851-200-031*	4851-200-031*
F	Bras, droit	1	4851-200-041*	4851-200-042*	4851-200-042*	4851-200-041*	4851-200-041*
G	Ensemble siège en mousse, capitoné	1	4853-020-100	4853-020-100	4853-020-100	4853-020-100	4853-020-100
H	Vis d'assemblage à six pans creux	4	0004-001-002	0004-001-002	0004-001-002	0004-001-002	0004-001-002
J	Support de barre en J	2	4855-100-135	4855-100-137	4855-100-136	4855-100-138	4855-100-134
K	Vis d'assemblage à tête hexagonale	6	0004-001-004	0004-001-004	0004-001-004	0004-001-004	0004-001-004
L	Dossier, dossier souple, capitonné	1	4855-010-100**	4855-010-100**	4855-010-100**	4855-010-100**	4855-010-100**
M	Vis d'assemblage à six pans creux	6	0004-001-003**	0004-001-003**	0004-001-003**	0004-001-003**	0004-001-003**
N	Panneau arrière, dossier souple, capitoné	1	4855-011-100**	4855-011-100**	4855-011-100**	4855-011-100**	4855-011-100**
T	Rondelle de blocage	6	0012-001-001	0012-001-001	0012-001-001	0012-001-001	0012-001-001
P	Machon, Appui Bras	2	4851-200-001	4851-200-001	4851-200-001	4851-200-001	4851-200-001


* Indiqué à titre de référence uniquement. Ces ensembles ou pièces ne sont pas vendus séparément.

** Pour les trousse, voir la "Liste de référence rapide des pièces de rechange" on [page 2-15](#).

Modèle 4857 : repose-pieds

4857-010-000 Rév E (Référence uniquement)

Français

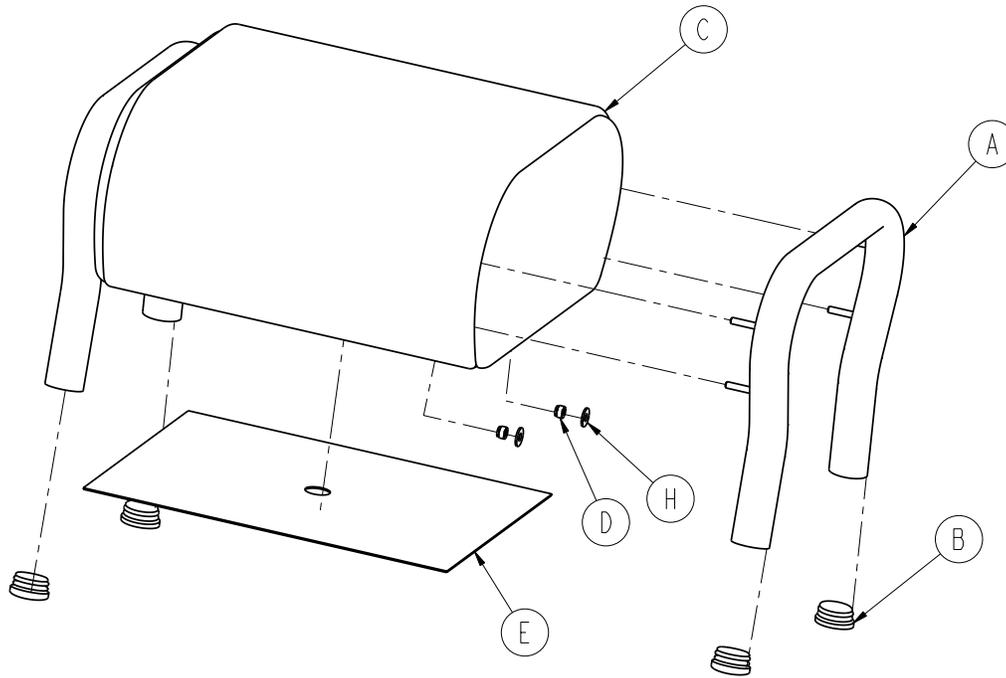

Article	Description	Qté	4857-010-001 Châtaigne (A)	4857-010-002 Blanc (B)	4857-010-003 Nickel satiné (C)	4857-010-004 Orange/ Marron (D)	4857-010-005 Noir (E)
A	Ensemble châs- sis, repose-pieds	2	4857-110-012*	4857-110-014*	4857-110-013*	4857-110-015*	4857-110-011*
B	Patin	4	4850-100-127	4850-100-128	4850-100-128	4850-100-127	4850-100-127
C	Ensemble repose- pieds, capitonné	1	4857-020-100*	4857-020-100*	4857-020-100*	4857-020-100*	4857-020-100*
D	Écrou frein hexagonal	8	0016-142-000*	0016-142-000*	0016-142-000*	0016-142-000*	0016-142-000*
E	Carton du repose-pieds	1	4857-020-130*	4857-020-130*	4857-020-130*	4857-020-130*	4857-020-130*
H	Rondelle	8	0011-001-004*	0011-001-004*	0011-001-004*	0011-001-004*	0011-001-004*

* Indiqué à titre de référence uniquement. Ces ensembles ou pièces ne sont vendus séparément.

[Retour à la table des matières](#)

Garantie

Le savoir-faire de Stryker Medical se tient derrière tous nos produits. Notre mission est d'offrir à nos clients des produits de qualité et nous nous engageons à résoudre tout problème dans les plus brefs délais selon les conditions stipulées dans les garanties ci-dessous.

GARANTIE LIMITÉE À VIE

Stryker garantit notre mobilier Michael Graves en collaboration avec Stryker pour les fauteuils de patient et repose-pieds pendant la durée de vie prévue de dix (10) ans dans les conditions normales d'utilisation et d'entretien appropriées. Sous réserve des limitations décrites plus bas, Stryker réparera ou, à son entière discrétion, remplacera les produits défectueux sans frais.

Mobilier Michael Graves en collaboration avec Stryker pour les fauteuils de patient et repose-pieds

- 10 ans sur les bras et les châssis en acier
- 10 ans sur les composants de châssis en bois
- 3 ans sur la mousse et les textiles de Stryker Medical

La garantie limitée à vie mentionnée plus haut sera sans effet en cas de modifications, de mauvaise utilisation, d'assemblage ou d'entretien inappropriés, d'accidents ou de dommages causés par un transporteur autre que Stryker Medical, et par l'utilisation du propre matériel du client.

Hormis les clauses énoncées aux présentes, Stryker ne fait aucune autre garantie ou déclaration, expresse ou implicite. Aucune garantie n'est faite quant à la qualité marchande ou l'adéquation à un usage particulier. En aucun cas, Stryker ne peut être tenue responsable, au titre des présentes, de tout dommage accessoire ou indirect découlant de ou lié de toute autre manière à la vente ou à l'utilisation d'un tel équipement.

PIÈCES DE RECHANGE ET SERVICE

Les produits Stryker bénéficient du soutien d'un réseau national de représentants de service spécialisés Stryker. Ces représentants locaux sont formés dans nos usines et disposent de stocks importants de pièces de rechange, ce qui permet de réduire au minimum les délais de réparation. Il suffit d'appeler le représentant local ou de contacter le service à la clientèle Stryker aux États-Unis au 1-800-327-0770.

AUTORISATION DE RENVOI

Le renvoi de produits ne peut être effectué sans l'accord du service à la clientèle de Stryker. Le numéro d'autorisation qui sera fourni doit être inscrit sur le produit renvoyé. Stryker se réserve le droit de facturer des frais d'expédition et de stockage sur les articles retournés. Les articles spéciaux, modifiés ou de fin de série ne peuvent pas faire l'objet d'un renvoi.

MARCHANDISE ENDOMMAGÉE

La réglementation ICC (Interstate Commerce Commission) exige que les réclamations relatives aux produits endommagés soient remises au transporteur dans les quinze (15) jours suivant la réception du produit. **Ne pas accepter de livraisons endommagées à moins que lesdits dommages ne soient signalés sur le bordereau de livraison au moment de la réception.** Aviser immédiatement Stryker, qui formulera une réclamation auprès du transporteur approprié pour dommages encourus. Le montant de la demande de règlement sera limité au coût de remplacement réel. Si cette information n'est pas reçue par Stryker dans les quinze (15) jours suivant la livraison du produit ou si les dommages ne sont pas signalés sur le bordereau de livraison au moment de la réception, le client reste redevable du paiement intégral de la facture d'origine. Les demandes de règlement pour livraison incomplète doivent être déposées dans les trente (30) jours suivant la date de la facture.

CLAUSE DE GARANTIE INTERNATIONALE

La présente garantie reflète les dispositions en vigueur aux États-Unis. Hors des États-Unis, la garantie peut différer selon le pays. L'utilisateur doit communiquer avec le représentant local de Stryker Medical pour de plus amples renseignements.

[Retour à la table des matières](#)



Stryker Medical
3800 E. Centre Ave.,
Portage, Michigan 49002
USA

stryker[®]