

Lit MedSurg

Modèle FL23P

stryker®

Manuel d'entretien



Pièces et assistance technique :
USA : 1-800-327-0770 (option 2)
Canada : 1-888-233-6888

Table des matières

Introduction	6
Utilisation	6
Illustration du produit	6
Renseignements techniques	7
Attention / avertissement / remarque	7
Symboles	8
Entretien préventif	9
Vérifications annuelles	9
Instructions de lubrification	10
Vérifications annuelles de lubrification	10
Nettoyage	12
Nettoyage du lit	12
Entretien du matelas	12
Pièces de rechange à conserver	13
Procédures d'entretien	14
Option antivol	14
Procédure de remplacement - Côté de lit - Barrière	15
Procédure de remplacement - Ensemble d'un côté de lit	17
Procédure de remplacement - Plaque de transfert	18
Procédure de remplacement - section de pied courte	19
Procédure de remplacement - section de pied longue	19
Procédure de remplacement - Section de pied courte	20
Procédure de remplacement - Section de pied longue	20
Procédure de remplacement - Section de cuisse (Seulement avec la section de pied courte)	22
Procédure de remplacement - Section de siège	23
Procédure de remplacement - Section de tête	24
Procédure de remplacement - Manivelle	26
Procédure de remplacement - Vérin de la section de tête	27
Procédure de remplacement - Vérin de la section de cuisse	29
Lubrification de la vis des vérins de la section de tête et de la section de cuisse	31
Mécanisme d'élévation du lit - Remplacement de l'écrou moulé et/ou de la vis de pied	32
Base - Pédale de frein/direction	34
Base - Roulette de la 5 ^e roue (en option)	35
Base - Ensemble du bras plongeant de la 5 ^e roue (en option)	36
Roulette du lit	37
Barre de liaison du mécanisme de freinage	38
Roulette du lit avec freinage intégré	39
Dessins d'assemblage	
Base	41
Lit sur pattes 6"	42

Table des matières

Dessins d'assemblage (suite)

Mécanisme de freinage sans 5 ^e roue	43
Mécanisme de freinage avec 5 ^e roue.	47
Roulettes 6" sans 5 ^e roue	49
Roulettes 6" avec 5 ^e roue	50
Roulettes 6" avec frein individuel.	51
5 ^e roue	53
Mécanisme d'élévation.	57
Châssis court.	61
Pare-chocs - Une roulette rigide	63
Pare-chocs - Deux roulettes souples.	64
Pare-choc de lit court.	65
Options Trendelenburg et élévation de pied	66
Options Trendelenburg	71
Option élévation de pied.	75
Sans mouvements optionnels	79
Levage tête	81
Sans option tige soluté	85
Avec option tige porte-soluté	86
Manivelles fixes	87
Manivelle amovible.	89
Manivelle fixe sans section de cuisse	91
Manivelle amovible sans section de cuisse	93
Manivelle pour option manivelle amovible	94
Sommier de pied court avec crochets	95
Sommier de pied court sans crochets	97
Sommier de pied long avec crochets.	99
Sommier de pied long sans crochets.	101
Autocollants anglais seulement	103
Autocollants anglais/espagnol	105
Autocollants français/anglais.	107
Côté de lit pleine longueur rétractable sans contrôle	109
Côté de lit mi-longueur rétractable	113
Côté de lit mi-longueur tête seulement	117
Panneau de mélamine	121
Panneau MDF stratifié	123
Panneaux massifs	125
Ensemble de poteaux.	127
Vis de blocage de panneau	129

Table des matières

Accessoires optionnels du lit	131
Tige porte-soluté amovible (en option) - FDTSH	132
Tige porte-soluté amovible diamètre de un pouce (en option) - FA61002-G	133
Tige porte-soluté fixe diamètre de un pouce (en option) - FA64157	134
Support à moniteur (en option) - FA64153	135
Support vertical pour bouteille oxygène (en option) - FA64117	136
Support de bouteille à oxygène (en option) - FA64036-G	137
Trapèze (en option) - FA64145	139
Coussins protecteurs côtés de lit mi-longueur (en option) - DM64232.	141
Coussins protecteurs côtés de lit pleine longueur (en option) - DM64176	141
Garantie	142
Garantie limitée	142
Pièces et service	142
Couverture des contrats de service	142
Programmes de contrats de service.	143
Autorisation de retour	143
Marchandise endommagée.	143
Clause de garantie internationale	143


Introduction

UTILISATION

Ce manuel est conçu pour vous aider dans l'entretien du lit de soins médicaux manuel MedSurg, modèle FL23P. Lisez-le attentivement avant de commencer l'entretien de ce lit. Ce guide doit être à la disposition du personnel d'entretien en tout temps.


Le manuel d'entretien fait partie intégrante du lit et doit être remis à son nouveau propriétaire dans le cas d'un transfert ou d'une vente.

ILLUSTRATION DU PRODUIT

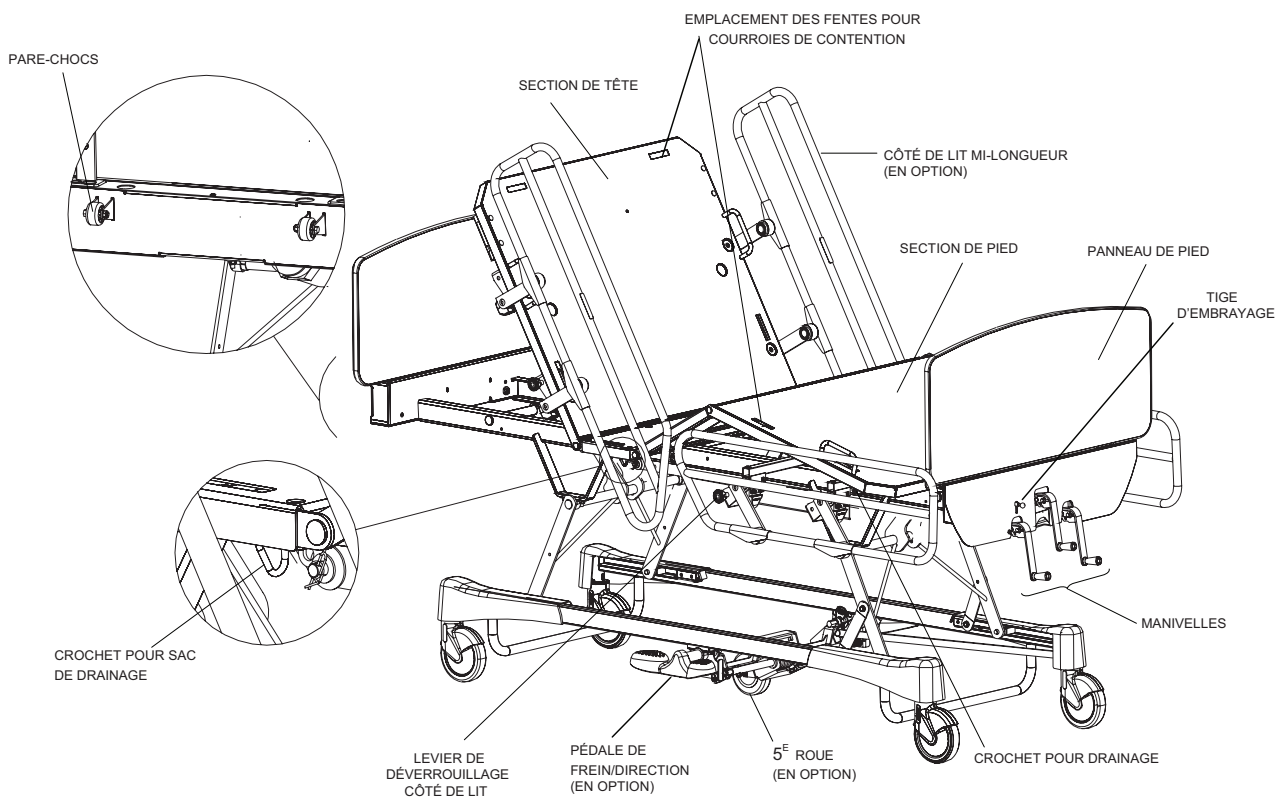

Introduction

RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES

	Charge de sécurité*		
	Remarque : La charge de sécurité est la somme du poids du patient, du matelas et des accessoires.	500 lb	227 kg
Longueur/largeur hors-tout	Côtés de lit mi-longueur relevés Côtés de lit pleine longueur relevés	90.4" x 41.3" 90.4" x 39.9"	2296 x 1049 mm 2296 x 1013 mm
Poids avec panneaux		390 lb	177 kg
Sommier		35 x 78"	89 x 198 cm
Dimension du matelas recommandé	Longueur/largeur	35 x 78" ou 80"	89 x 198 cm ou 203 cm
	Épaisseur maximale	6"	15.24 cm
Élévation minimum/maximum du lit		15" à 29"	38.1 à 73.66 cm
Angle de la section de tête		0° à 62°	
Angle de la section de cuisse		0° à 32°	
Trendelenburg Reverse Trendelenburg		+14° à -14°	

Stryker se réserve le droit de modifier les renseignements techniques sans préavis.

Les renseignements techniques énumérés ci-dessus sont approximatifs et peuvent varier d'un lit à l'autre.

ATTENTION / AVERTISSEMENT / REMARQUE

Les mots **ATTENTION**, **AVERTISSEMENT** et **REMARQUE** ont une signification particulière que vous devez absolument respecter.

ATTENTION

Concerne la sécurité personnelle du patient ou de l'utilisateur. Le non-respect de cette information peut provoquer des risques de blessures au patient ou à l'utilisateur.

AVERTISSEMENT

Alerte le lecteur d'une situation qui pourrait être dangereuse et qui, si non évitée, pourrait causer des blessures mineures ou modérées au patient ou à l'utilisateur ainsi que des dommages à l'équipement ou à toute autre propriété. L'avertissement contient aussi les soins nécessaires pour l'utilisation efficace et sécuritaire du produit et les méthodes particulières afin d'éviter d'endommager le produit suite à son utilisation selon les normes ou non.

Remarque

Contient de l'information particulière pour faciliter l'utilisation, l'entretien ou préciser des recommandations importantes.

[Retour à la table des matières](#)

Symboles



Attention, se référer à la documentation jointe



Symbole de charge maximale de sécurité

Entretien préventif

ATTENTION

N'utilisez que des pièces de remplacement identiques fournies par Stryker, lors de l'entretien de ce produit.

VÉRIFICATIONS ANNUELLES

- _____ Tous les articles de fixation sont bien serrés.
- _____ Vérifiez l'usure des entretoises à épaulement utilisées aux points d'articulation du lit. **Ne les lubrifiez pas**, remplacez-les au besoin.
- _____ Vérifiez le mécanisme complet de chaque côté de lit; assurez-vous que toutes les pièces mobiles et fixes sont bien boulonnées. Un côté qui ne se manoeuvre qu'avec difficulté, qui ne se verrouille pas en position haute ou se verrouille avec difficulté est souvent le résultat d'un boulonnage déficient. Resserrez les boulons et écrous.
- _____ Vérifiez ensuite l'opération de chaque côté de lit : le pivotement du côté doit se faire sans résistance et le verrouillage en position haute doit être immédiat; en position verrouillée, le côté doit être totalement immobilisé et offrir une prise ferme; le côté doit s'abaisser uniquement en ayant recours au levier de déverrouillage.
- _____ Enfoncez, de chaque côté du lit, le côté de la pédale identifié par l'étiquette rouge et assurez-vous que les freins sont appliqués et le lit bien immobilisé. Ramenez la pédale au neutre et assurez-vous que les freins sont relâchés.
- _____ Enfoncez, de chaque côté du lit, le côté de la pédale identifié par l'étiquette verte et assurez-vous que le mode directionnel - roulette directionnelle du lit ou 5^e roue (en option) - est activé. Ramenez la pédale au neutre et assurez-vous que le mode directionnel est désactivé.
- _____ Vérifiez les positionnements *Trendelenburg*. Reportez-vous à la section «Positionnement *Trendelenburg*» du guide de l'utilisateur pour activer ces positions.
- _____ La tige de soutien de la section de pied fonctionne correctement.
- _____ Aucune fissure dans les panneaux du lit.
- _____ Les pare-chocs situés à la tête du lit sont solidement fixés et fonctionnent correctement.
- _____ Les housses de matelas ne comportent aucune déchirure, ni trou; remplacez le cas échéant.
- _____ Les roulettes fonctionnent correctement. Vérifiez l'usure ou la présence de coupure sur la surface de roulement. Enlevez la saleté accumulée.
- _____ Vérifiez et lubrifiez au besoin les points de lubrification énumérés et illustrés à la section «Instructions de lubrification», [page 10](#).

Remarque

Il peut être nécessaire de procéder plus fréquemment à cet entretien préventif si le lit est utilisé de façon intensive.

Numéro de série du lit :		

Complété par : _____

Date : _____

[Retour à la table des matières](#)

Entretien préventif

INSTRUCTIONS DE LUBRIFICATION

Vous trouverez ci-dessous la liste des points du lit à lubrifier. La lubrification doit se faire sur une base annuelle.

ATTENTION

L'utilisation de graisses autres que celle recommandée (OG 2) risque d'entraîner une détérioration des composants critiques du lit ainsi que des bris de mécanisme susceptibles de causer des blessures à l'utilisateur et/ou au patient et des dommages au lit.

AVERTISSEMENT

Ce lit utilise des entretoises à épaulement autolubrifiantes aux points d'articulation. Ne lubrifiez pas ces entretoises. Si elles sont usées, remplacez-les.

VÉRIFICATIONS ANNUELLES DE LUBRIFICATION

___ Mécanisme d'élévation du lit (Figure 2.2A, page 11)

- Lubrifiez les filets des deux vis du mécanisme d'élévation. Ne lubrifiez que la partie parcourue par l'écrou. Actionnez le mécanisme d'élévation plusieurs fois pour répartir la graisse.
- Lubrifiez le chemin parcouru par la fourchette du mécanisme d'embrayage sur la boîte de couplage.

___ Vis des vérins de tête et de cuisse (Figure 2.2B, page 11)

- Lubrifiez la vis de chacun des deux vérins. Référez-vous à la page 31 pour la procédure de lubrification de ces vis.

___ Manivelles (Figure 2.2C, page 11)



- Nettoyez et graissez au besoin l'articulation servant de pivot escamotable.

Numéro de série du lit :		

Complété par : _____

Date : _____

Entretien préventif

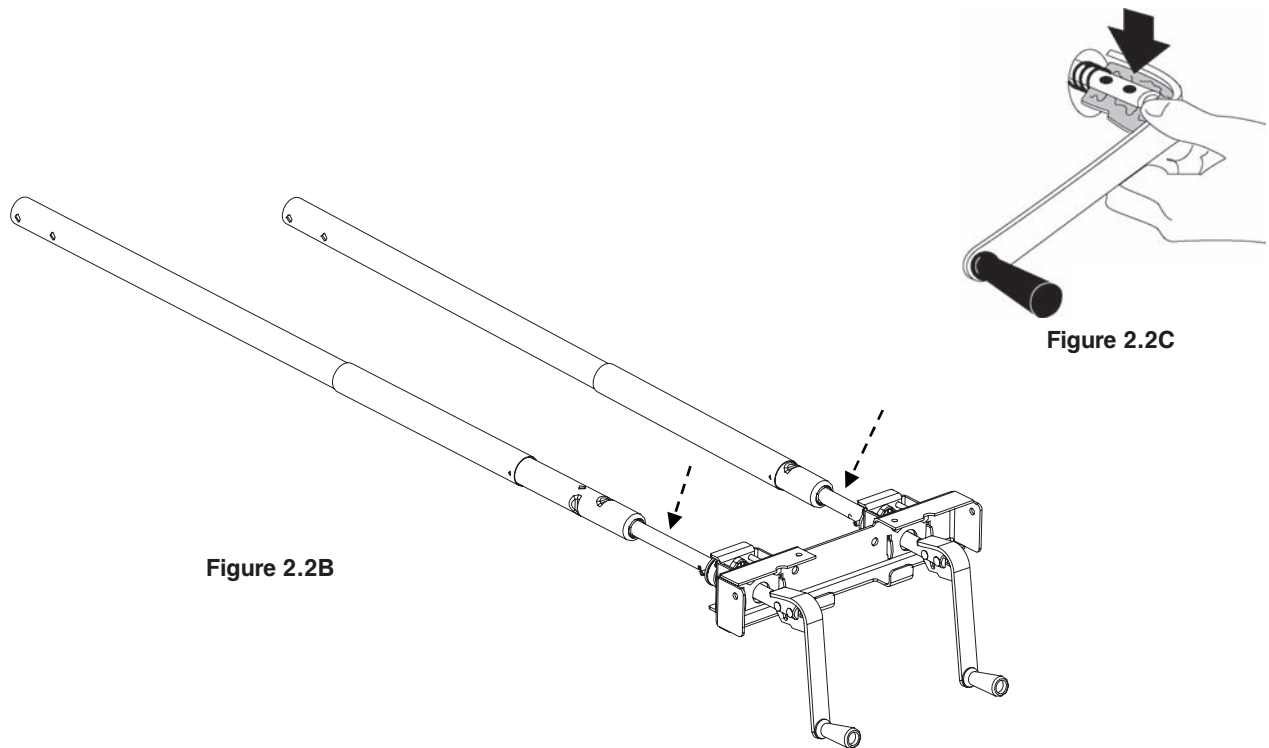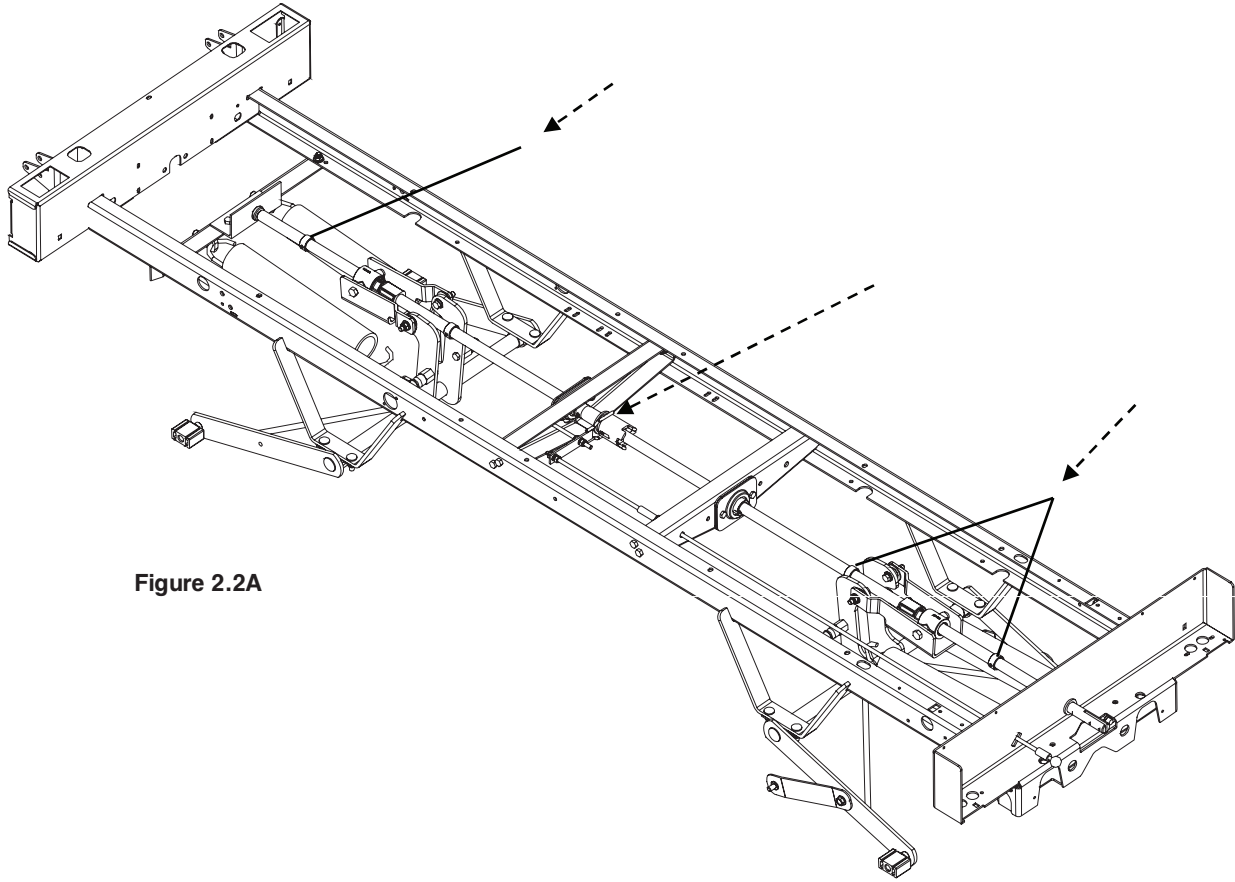

[Retour à la table des matières](#)

Nettoyage

NETTOYAGE DU LIT

Nettoyez toutes les surfaces du lit avec de l'eau tiède et un détergent doux. Essuyez le lit et séchez-le complètement pour éviter l'accumulation de solution de nettoyage. Ne lavez pas le lit à la vapeur ou au jet d'eau. N'immergez aucune pièce du lit. Certaines pièces internes du lit sont électriques et peuvent être endommagées si elles sont exposées à l'eau.

Produits nettoyants pour les surfaces du lit :

- Nettoyants quaternaires (ingrédient actif - chlorure d'ammonium).
- Nettoyants phénoliques (ingrédient actif - o-phénylphénol).
- Solution de javellisant chloré (5.25% - moins de une part de javellisant pour cent parts d'eau).

Évitez de trop saturer et assurez-vous que le produit ne reste pas humide plus longtemps que prévu dans les instructions chimiques du fabricant pour une désinfection adéquate.

AVERTISSEMENT

CERTAINS PRODUITS DE NETTOYAGE SONT CORROSIFS ET PEUVENT ÊTRE ENDOMMAGEABLES SI LE PRODUIT N'EST PAS ADÉQUATEMENT UTILISÉ. Si les produits énumérés ci-dessus sont utilisés pour nettoyer des appareils de soins de Stryker, des mesures doivent être prises pour s'assurer que les lits sont rincés avec un linge humide cleaning trempé dans de l'eau claire et complètement séché après le nettoyage. Si le lit n'est pas adéquatement rincé et séché, des résidus corrosifs risquent de se former à la surface du lit, causant une corrosion prématurée des composantes critiques. La garantie de ce produit peut être annulée si les instructions ci-dessus ne sont pas respectées lors de l'utilisation de ce type de nettoyant.

ENTRETIEN DU MATELAS

Vérifiez le matelas après chaque utilisation. Cessez de l'utiliser si la housse du matelas présente des craques ou des fissures puisque ces ouvertures peuvent permettre aux liquides de s'infiltrer dans le matelas.

Pièces de rechange à conserver

Les pièces et accessoires énumérés sur cette page sont tous disponibles pour vente. Certaines pièces nommées sur les dessins d'assemblage de ce manuel peuvent ne pas être disponibles individuellement pour la vente. Veuillez contacter le service à la clientèle de Stryker aux États-Unis : 1 800 327-0770 ou au Canada: 1 888 233-6888 pour la disponibilité et le prix.

Description	Numéro de pièce
Composants des côtés de lit	
Plaque de transfert droite - côté de lit mi-longueur	23-0778G / 23-0818G
Plaque de transfert gauche - côté de lit mi-longueur	23-0777G / 23-0817G
Composants du sommier	
Arrêt de matelas	QDF23-0831C
Bloc porte-tige	QP17-0121-07 / QP23-0829
Roulettes	
6" avec mécanisme de blocage	RD25038807
6" sans mécanisme de blocage	RD25049307
6" avec mécanisme directionnel	RD25049607
Roulette du mécanisme de la 5 ^e roue (en option)	RL5
Roulette 6" avec frein intégré	RD23084207
Composants de la base	
Autocollant vert - 5 ^e roue	QE71-0496
Autocollant rouge - frein	QE71-0511
Pédale de frein/direction	QP23-0627
Divers	
Contenant de peinture de retouche gris	DDCAP-GSP
Entretoise à épaulement	QDF17-0020
Attache de câble en nylon	QDF9518

[Retour à la table des matières](#)

Procédures d'entretien

ATTENTION

- Afin d'éviter des blessures lorsque vous travaillez sous le lit en position haute, placez toujours des blocs sous les leviers d'élévation du lit et appliquez les freins.
- L'entretien de ce lit ne devrait être confié qu'à du personnel d'entretien qualifié, à défaut de quoi il pourrait en résulter des dommages au lit ou des blessures sérieuses au patient et/ou à l'utilisateur.

Remarque

Les termes «droit» et «gauche» utilisés dans ce manuel réfèrent aux côtés droit et gauche d'un patient allongé sur le dos dans le lit.

OPTION ANTIVOL

Le lit peut être muni de l'option antivol pour éviter que certaines pièces ne soient démontées par d'autre personne que le personnel médical et celui d'entretien. Si cette option est présente sur le lit, référez-vous au tableau ci-dessous pour l'équivalent des outils et des pièces réguliers énumérés dans les pages qui suivent («Procédures d'entretien»).

Outils réguliers	Outil pour option antivol
Douille 7/16"	Douille antivol #20 (Écrou 1/4")
Douille 1/2"	Douille antivol #30 (Écrou 5/16")
Douille 9/16"	Douille antivol #30 (Écrou 3/8")
Clé 7/16"	T-30 antivol
Clé 1/2"	T-40 antivol
Clé 9/16"	T-40 antivol
Tournevis Phillips	T-15, T-25 ou T-30 antivol (selon le format de vis)

Remarque

Un ensemble d'outil FA64235 regroupant tous les outils du tableau ci-dessus est disponible.

Procédures d'entretien

PROCÉDURE DE REMPLACEMENT - CÔTÉ DE LIT - BARRIÈRE

Remarque

Si le lit est muni de l'option antivol, référez-vous au tableau à la [page 14](#).

Outils nécessaires :

- Petit tournevis régulier
- Pincés à long bec
- Maillet en caoutchouc
- Douille 7/16"
- Clé à cliquet 3/8"

Procédure :

1. Montez complètement le lit et appliquez les freins.
2. Placez toutes les sections du sommier en position horizontale.
3. Débranchez le cordon d'alimentation du lit de la prise murale.
4. Relevez le côté de lit à réparer.
5. À l'aide du petit tournevis régulier et des pincés à long bec, retirez les deux bouchons de protection (A). Manipulez les outils avec soin pour éviter d'abîmer la peinture du côté de lit.

Remarque

Remplacez les bouchons à l'aide du maillet en caoutchouc. Le retrait des bouchons de protection risque de les endommager. Assurez-vous d'en avoir de remplacement sous la main.

6. a. Pour un côté de tête, à l'aide d'une douille 7/16" retirez l'écrou, la rondelle ressort et l'espaceur maintenant le côté de lit en place.
b. Pour un côté de pied, retirez à l'aide d'une douille 7/16" l'écrou, la rondelle ressort et l'espaceur maintenant le côté de lit en place (B).

Remarque

Vérifiez l'usure des coussinets autolubrifiants et remplacez-les au besoin.

7. Inversez les étapes précédentes pour installer la nouvelle barrière.
8. Vérifiez le mouvement de la barrière avant de remettre le lit en service.

Procédures d'entretien

PROCÉDURE DE REMPLACEMENT - CÔTÉ DE LIT - BARRIÈRE (SUITE)

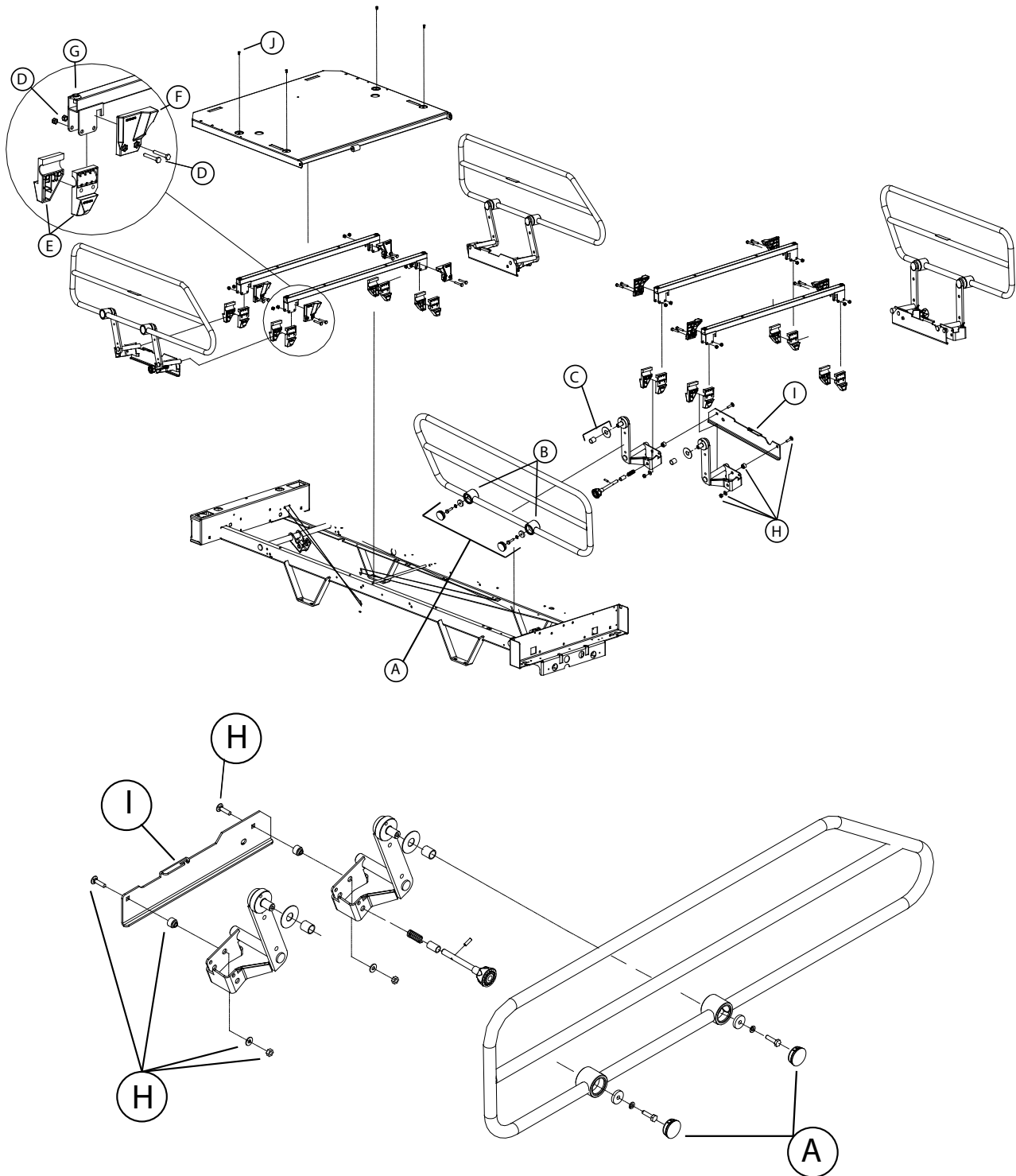


Figure 3.1A

Procédures d'entretien

PROCÉDURE DE REMPLACEMENT - ENSEMBLE D'UN CÔTÉ DE LIT

Remarque

Si le lit est muni de l'option antivol, référez-vous au tableau à la [page 14](#).

Outils nécessaires :

- Clé à cliquet 3/8"
- Douille 7/16"
- Clé mixte 7/16"
- Pince coupante

Procédure :

Remarque

À moins d'indications contraires, référez-vous à la figure 3.1A, [page 16](#) pour l'illustration des références contenues dans la procédure de remplacement qui suit.

1. Montez le lit complètement et appliquez les freins.
2. Selon la position du côté de lit à remplacer, placez les sections du sommier comme suit :
 - **Côté de lit de tête** : montez la section de tête complètement.
 - **Côté de lit de pied** : baissez la section de tête complètement. Montez la section de cuisse complètement, puis soulevez et rabattez la section de pied vers la tête du lit.
3. Relevez le côté de lit à réparer.
4. À l'aide d'une douille 7/16" et d'une clé mixte 7/16", retirez les deux écrous et boulons (D) retenant les demi-coussinets (E), le glisseur de rétraction (F) et le mécanisme de côté de lit à chacun des deux supports de côté de lit - tenez bien les coussinets pour les empêcher de tomber au sol.

Remarque

Retirez d'abord les deux écrous et boulons d'un côté de l'ensemble et, tout en maintenant l'ensemble, terminez par ceux du côté opposé.

5. Inversez les étapes précédentes pour installer le nouvel ensemble de côté de lit.
6. Vérifiez le fonctionnement du côté de lit avant de remettre le lit en service.

Procédures d'entretien

PROCÉDURE DE REMPLACEMENT - PLAQUE DE TRANSFERT

Remarque

Si le lit est muni de l'option antivol, référez-vous au tableau à la [page 14](#).

Outils nécessaires :

- Clé à cliquet 3/8"
- Douille 7/16"
- Clé mixte 7/16"
- Clé dynamométrique

Procédure :

Remarque

À moins d'indications contraires, référez-vous à la figure 3.1A, [page 16](#) pour l'illustration des références contenues dans la procédure qui suit.

1. Montez le lit complètement et appliquez les freins.
2. Selon le type et la position du côté de lit à réparer, placez les sections du sommier comme suit :
 - **Côté de lit de tête** : levez complètement la section de tête.
 - **Côté de lit de pied** : baissez complètement la section de tête. Levez complètement la section de cuisse, puis soulevez et rabattez la section de pied vers la tête du lit.
3. Baissez le côté de lit à réparer.
4. À l'aide d'une douille 7/16" et d'une clé mixte 7/16", retirez les deux écrous, manchons, rondelles de métal et boulons (H) retenant la plaque de transfert (I) au mécanisme du côté de lit.

Remarque

À l'assemblage, appliquez aux écrous un couple de serrage de 75 lb/po.

5. Inversez les étapes précédentes pour installer la nouvelle plaque de transfert.
6. Vérifiez le fonctionnement du côté de lit avant de remettre le lit en service.

Procédures d'entretien

PROCÉDURE DE REMPLACEMENT - SECTION DE PIED COURTE

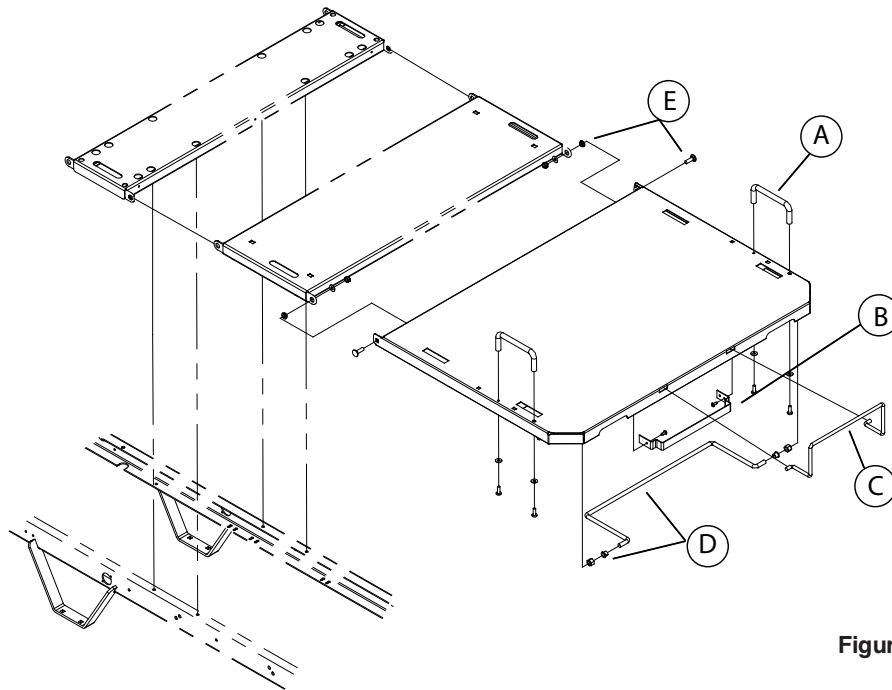


Figure 3.2A - court

PROCÉDURE DE REMPLACEMENT - SECTION DE PIED LONGUE

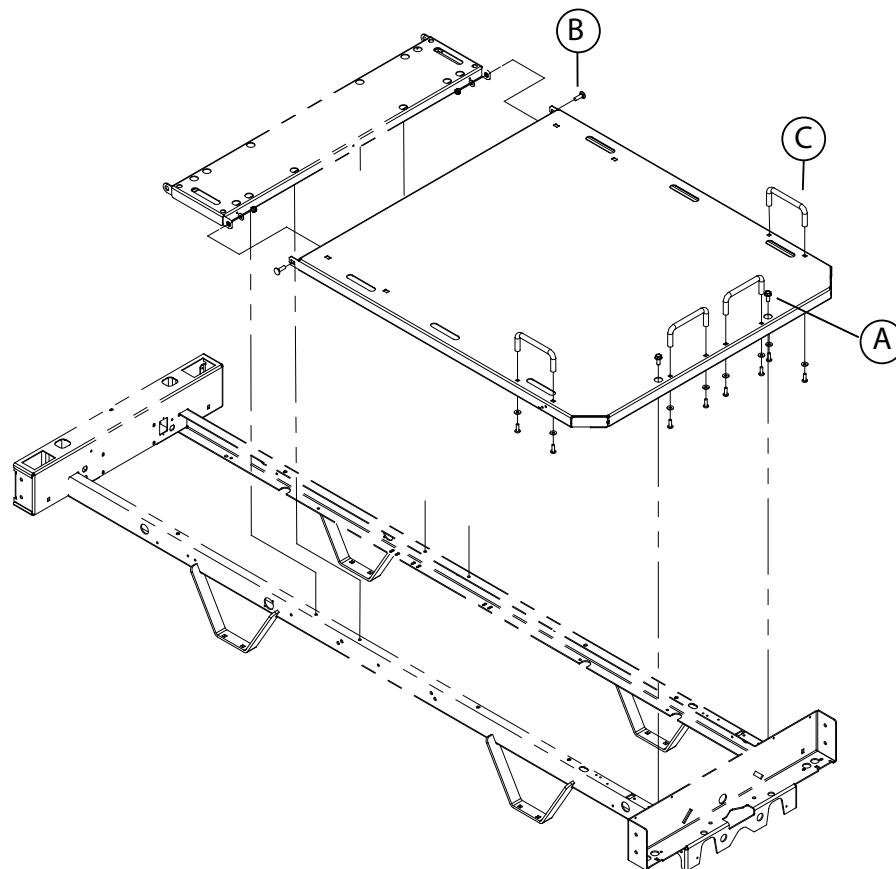


Figure 3.2A - long

Procédures d'entretien

PROCÉDURE DE REMPLACEMENT - SECTION DE PIED COURTE

Remarque

Si le lit est muni de l'option antivol, référez-vous au tableau à la [page 14](#).

Outils nécessaires :

Clé à cliquet, douille 7/16"	Clé mixte 1/2"	Clé mixte 9/16"
Tournevis Phillips	Câbles élastiques	

Procédure :

1. Montez le lit complètement et appliquez les freins. Placez le sommier à l'horizontal.
2. Abaissez les côtés de lit.
3. Soulevez et rabattez la section de pied vers la tête du lit. Attachez la section au lit à l'aide de câbles élastiques.
4. À l'aide du tournevis Phillips, retirez les deux arrêts de matelas latéraux (A).
5. Retirez le verrou de l'arrêt de matelas (B) à l'aide du tournevis Phillips.
6. Retirez l'arrêt de matelas de pied (C)
7. Retirez le support (D) de la section de pied à l'aide de la clé 9/16".
8. Enlevez les câbles élastiques et remplacez la section de pied à l'horizontal.
9. À l'aide d'une clé mixte 1/2", retirez les deux écrous, rondelles plates, entretoises à épaulement et boulons (E) reliant la section de pied à la section de cuisse et retirez la section défectueuse.
10. Inversez les étapes précédentes pour installer la nouvelle section de pied.
11. Vérifiez la mobilité de la section de pied avant de remettre le lit en service.

PROCÉDURE DE REMPLACEMENT - SECTION DE PIED LONGUE

Remarque

Si le lit est muni de l'option antivol, référez-vous au tableau à la [page 14](#).

Outils nécessaires :

- Clé à cliquet et douille 7/16" et 1/2"
- Clé mixte 1/2"
- Câbles élastiques

Procédure :

1. Montez le lit complètement et appliquez les freins. Placez le sommier à l'horizontal.
2. Abaissez les côtés de lit.
3. Retirez les boulons (A) à l'aide de la douille 1/2".
4. À l'aide de la clé 1/2", retirez les deux écrous, rondelles plates, et boulons (B) reliant la section de pied à la section de centre, retirez la section défectueuse.
5. À l'aide du tournevis Phillips, retirez les quatre arrêts de matelas (C) du sommier défectueux.
6. Inversez les étapes précédentes pour installer la nouvelle section de pied.
7. Vérifiez la mobilité de la section de pied avant de remettre le lit en service.

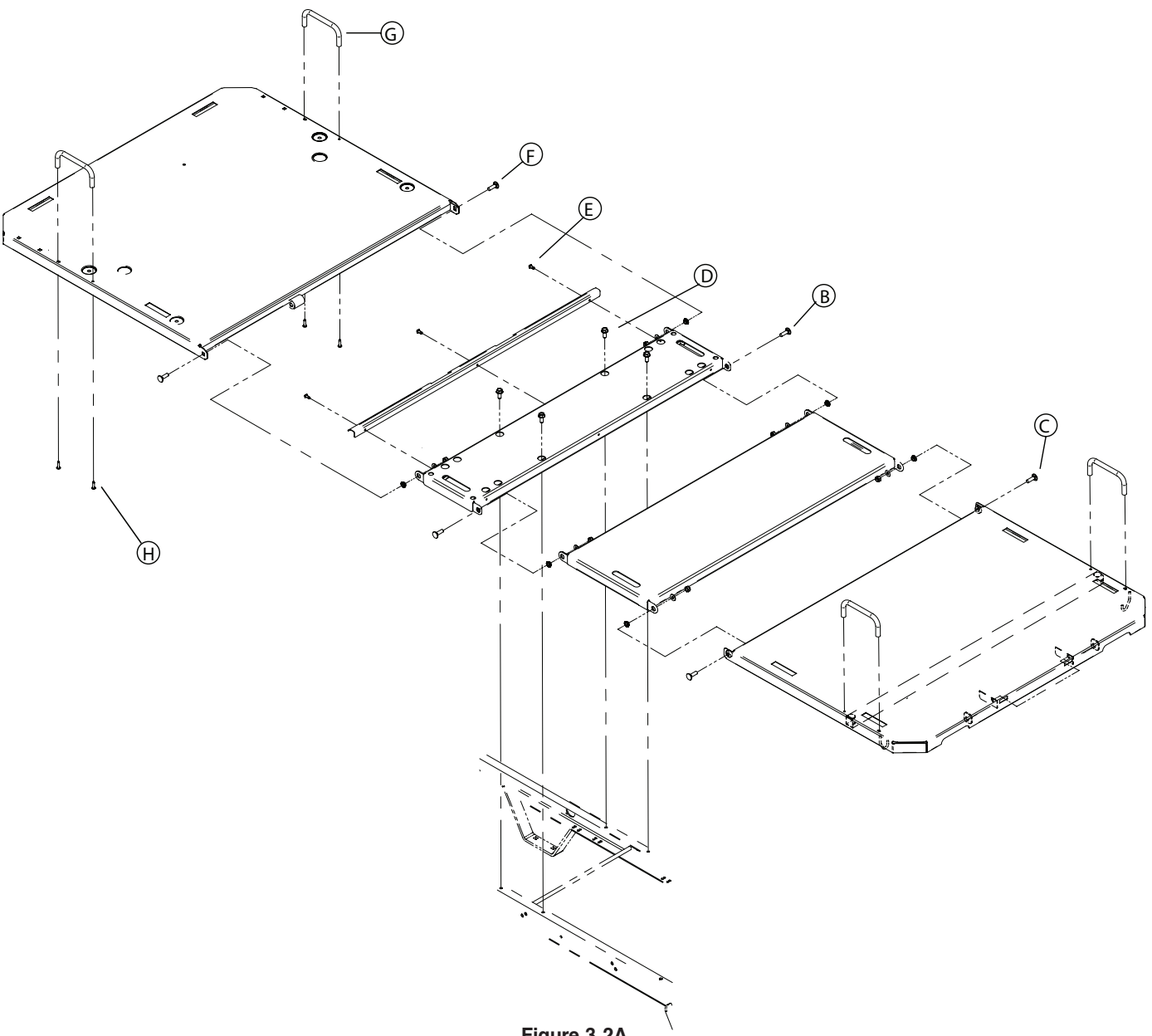


Figure 3.2A

Procédures d'entretien

PROCÉDURE DE REMPLACEMENT - SECTION DE CUISSE (SEULEMENT AVEC LA SECTION DE PIED COURTE)

Remarque


- Seulement avec section de pied courte.
- Si le lit est muni de l'option antivol, référez-vous au tableau à la [page 14](#).

Outils nécessaires :

- Clé Allen 5/32"
- Clé mixte 1/2"
- Câbles élastiques

Procédure :

1. Montez le lit complètement et appliquez les freins. Placez le sommier à l'horizontal.
2. Abaissez les côtés de lit.
3. À l'aide d'une clé 1/2" et de la clé Allen 5/32", retirez l'écrou, la rondelle et le boulon (A).
4. À l'aide d'une clé mixte 1/2", retirez les quatre écrous, rondelles plates, entretoises à épaulement et boulons (B, C) retenant la section de cuisse aux sections de pied et de siège et retirez la section de cuisse.
5. Inversez les étapes précédentes pour installer la nouvelle section de cuisse.
6. Vérifiez la mobilité de la section de cuisse avant de remettre le lit en service.

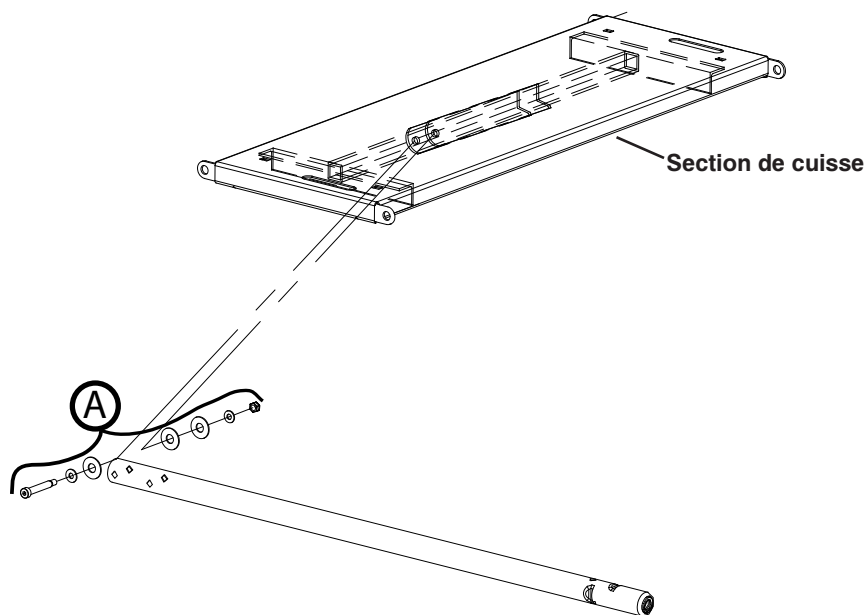

Procédures d'entretien

PROCÉDURE DE REMPLACEMENT - SECTION DE SIÈGE

Remarque

Si le lit est muni de l'option antivol, référez-vous au tableau à la [page 14](#).

Outils nécessaires :

- Clé à cliquet 3/8"
- Douille longue 1/2"
- Clé mixte 1/2"
- Tournevis Phillips
- Clé dynamométrique

Procédure :

Remarque

À moins d'indications contraires, référez-vous à la Figure 3.2A, [page 21](#) pour l'illustration des références contenues dans la procédure de remplacement qui suit.

1. Montez le lit complètement et appliquez les freins. Placez le sommier à l'horizontal.
2. Abaissez les côtés de lit.
3. À l'aide d'une douille longue 1/2", retirez les quatre vis (D) retenant la section de centre au châssis (voir [page 21](#)).

Remarque

Une fois enlevés, les boulons à filets roulants doivent d'abord être réinstallés manuellement, puis serrés à fond à un couple de 135 lb/po (14.7 Nm) à l'aide d'une clé dynamométrique.

4. À l'aide d'une clé mixte 1/2", retirez les quatre écrous, rondelles, entretoises à épaulement et boulons (B, F) retenant la section de centre aux sections de cuisse et de tête et retirez la section de cuisse.
5. Renversez la section de siège et retirez, à l'aide d'un tournevis Phillips, les trois vis (E) retenant l'angle protecteur à la section de siège. Conservez l'angle pour la nouvelle section.
6. Inversez les étapes précédentes pour installer la nouvelle section de siège.

PROCÉDURE DE REMPLACEMENT - SECTION DE TÊTE

Remarque

Si le lit est muni de l'option antivol, référez-vous au tableau à la [page 14](#).

Outils nécessaires :

- Clé à cliquet et douille 7/16"
- Tournevis Phillips
- Sangle
- Clé mixte 1/2" (2)

Procédure :

Remarque

À moins d'indications contraires, référez-vous à la figure 3.2A, [page 21](#) pour l'illustration des références contenues dans la procédure de remplacement qui suit.

1. Montez le lit complètement et appliquez les freins.
2. Si le lit est muni de côtés de lit pleine longueur, abaissez-les.
Si, par contre, le lit est muni de côtés de lit mi-longueur, relevez ceux de tête et abaissez ceux de pied.
3. Retirez le panneau de tête.
4. Montez complètement la section de tête et attachez-la solidement au lit à l'aide d'une sangle.
5. À l'aide d'un tournevis Phillips, retirez les deux arrêts de matelas latéraux (G) et conservez-les pour la nouvelle section de tête.
6. À l'aide de deux clés mixtes 1/2", retirez l'écrou à blocage, l'entretoise de nylon et le boulon (A) reliant la partie supérieure de la barre de compression à la section de tête et déposez la barre de compression.
7. À l'aide de deux clés mixtes 1/2", retirez l'écrou à blocage, l'entretoise à épaulement et le boulon (B) reliant le levier de sommier à la section de tête.
8. Retirez la sangle et baissez manuellement la section de tête complètement.
9. Abaissez les deux côtés de lit de tête, puis utilisez un tournevis Phillips pour retirer les 4 vis (J, Figure 3.1A, [page 16](#)) retenant les deux supports de côtés de lit à la section de tête. Laissez l'ensemble supports/côtés de lit reposer sur le châssis.
10. À l'aide d'une clé mixte 1/2", retirez les deux écrous, rondelles plates, entretoises à épaulement et boulons (F, Figure 3.2A, [page 21](#)) reliant la section de tête à la section de siège. Retirez la section de tête défectueuse.
11. Inversez les étapes précédentes pour installer la nouvelle section de tête.
12. Vérifiez la mobilité de la section de tête avant de remettre le lit en service.

PROCÉDURE DE REMPLACEMENT - SECTION DE TÊTE (SUITE)

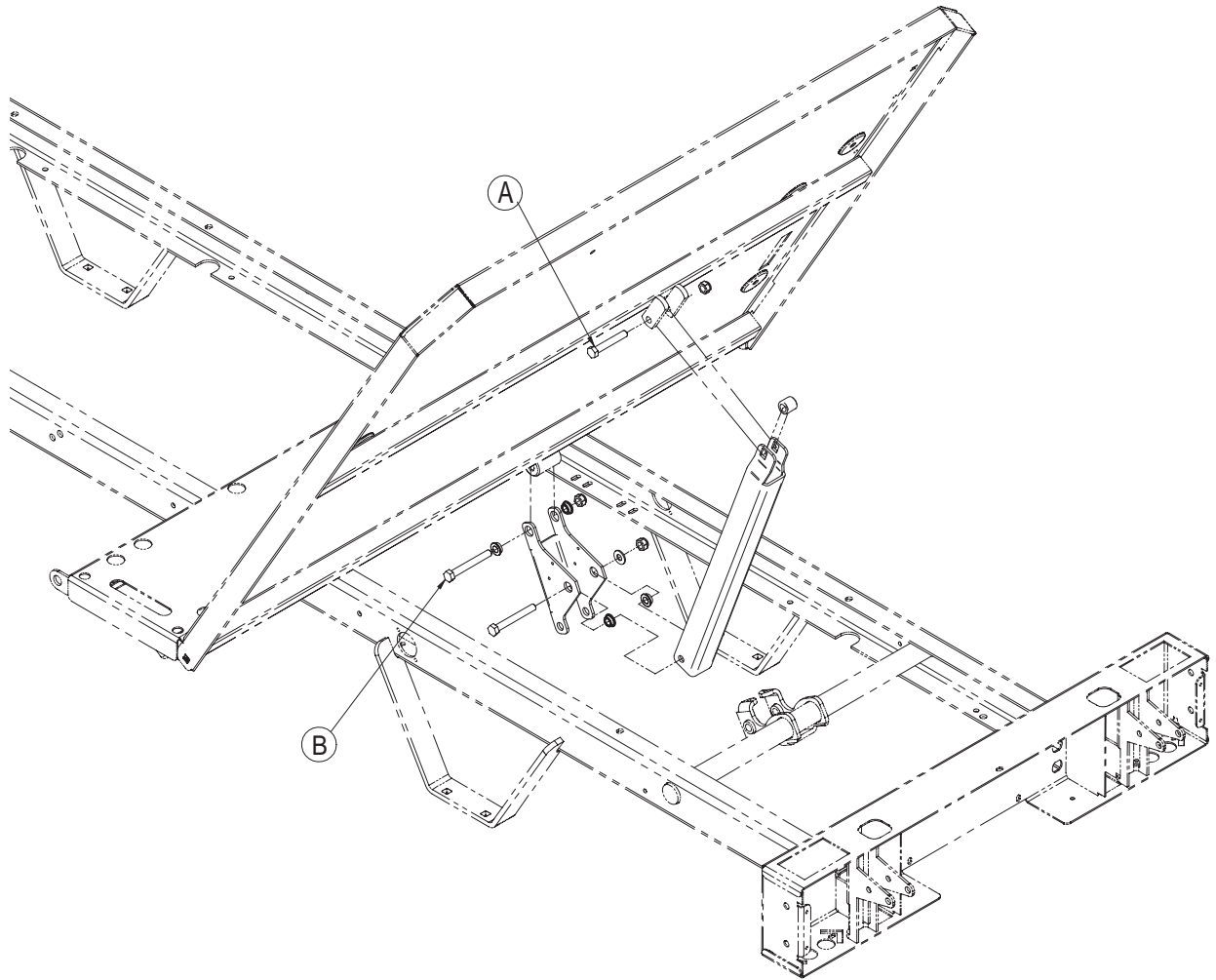


Figure 3.2B

Procédures d'entretien

PROCÉDURE DE REMPLACEMENT - MANIVELLE

Remarque

Si le lit est muni de l'option antivol, référez-vous au tableau à la [page 14](#).

Outils nécessaires :

Pince à étau
Tournevis Phillips
Marteau

Perceuse et mèche 1/4"
Poinçon 3/16" ou 1/4"
Graisse OG 2

Riveteuse
Ciment à filet - force moyenne (pourpre)

Procédure :

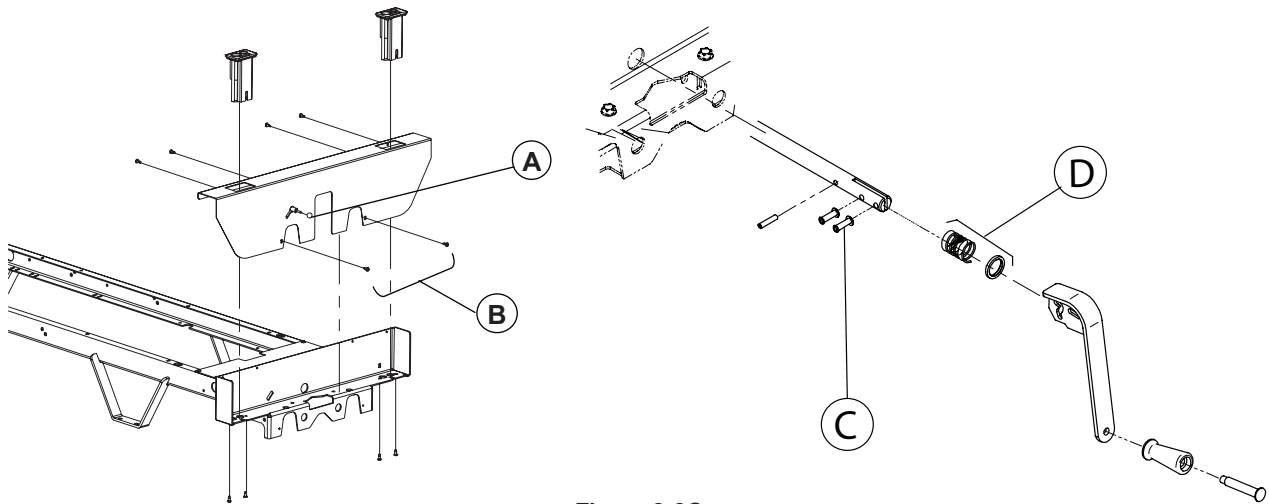


Figure 3.2C

1. Montez le lit complètement et appliquez les freins. Retirez le panneau de pied.
2. À l'aide d'une pince à étau, retirez le boulon (A) de la manette de positionnement *Trendelenburg*.

Remarque

Lors de l'assemblage du lit en usine, les filets de la manette ont été enduits d'un composé à blocage pour empêcher le bouton de se desserrer. Faites bien attention de ne pas briser le bouton au moment de le retirer. Lorsque vous revissez le bouton, enduisez les filets de la tige de ciment à filet de force moyenne.

3. À l'aide d'un tournevis Phillips, retirez les dix (10) vis (B) retenant le couvercle de la boîte de pied et retirez-le.
4. Tout en soutenant la manivelle avec le genou, fraisez les rivets (C) à l'aide d'une perceuse et d'une mèche 1/4".
5. Expulsez les rivets à l'aide d'un poinçon 3/16" ou 1/4" et d'un marteau. Retirez la manivelle. Laissez en place les rondelles de nylon et le ressort (D).
6. Mettez en position la nouvelle manivelle sur l'essieu après avoir graissé la partie mobile avec de la graisse OG 2.
7. Insérez deux nouveaux rivets et les bloquer en position à l'aide d'une riveteuse.
8. Vérifiez le fonctionnement de la nouvelle manivelle avant de remplacer les pièces précédemment retirées aux points 2 et 3 et de remettre le lit en service.

Procédures d'entretien

PROCÉDURE DE REMPLACEMENT - VÉRIN DE LA SECTION DE TÊTE

Remarque

Si le lit est muni de l'option antivol, référez-vous au tableau à la [page 14](#).

Outils nécessaires :

Câbles élastiques
Clé mixte 7/16"
Tournevis Phillips

Douille 7/16"
Clé 3/8"

Clé Allen 5/32"
Clé mixte 1/2"

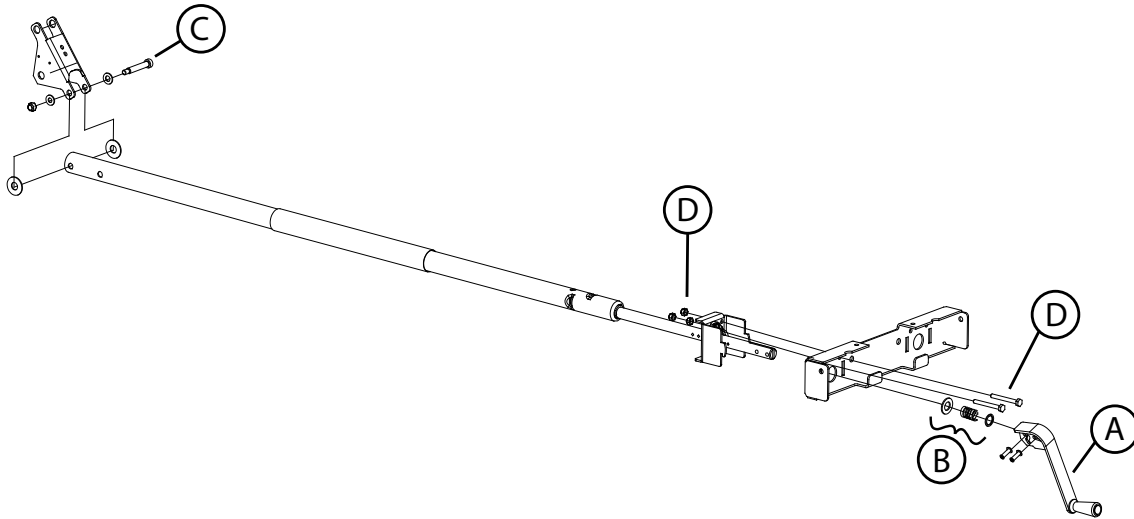


Figure 3.2D

Procédure :

1. Montez le lit complètement et appliquez les freins. Retirez le panneau de pied.
2. Soulevez la section de pied, rabattez-la vers la tête du lit et attachez-la au lit à l'aide d'un câble élastique.
3. À l'aide d'un tournevis Phillips, retirez les 4 vis fixant la plaque de recouvrement de pied au châssis du lit.
4. Retirez le couvercle de la boîte de pied (voir les étapes 2 et 3 de la «Procédure de remplacement - manivelle», [page 26](#)).
5. Ramenez la section de tête à l'horizontal et soutenez le tube du vérin à l'aide d'un câble élastique passé sous le tube et accroché de chaque côté du châssis.
6. Gardez la manivelle (A) (voir les étapes 4 et 5 de la «Procédure de remplacement - manivelle», [page 26](#)). Retirez et conservez les 2 rondelles de nylon et le ressort (B).

Remarque

N'oubliez pas de remettre en place les rondelles et le ressort avant de replacer la manivelle.

7. À l'aide de la clé 1/2" et de la clé Allen 5/32", démontez les rondelles, boulons et écrous (C) retenant la section de tête au tube de vérin de tête.
8. À l'aide d'une douille 7/16" et d'une clé mixte 7/16", retirez les deux écrous et boulons (D) retenant l'assemblage du vérin de tête sur la boîte de pied.

Procédures d'entretien

PROCÉDURE DE REMPLACEMENT - VÉRIN DE LA SECTION DE TÊTE (SUITE)

Remarque

Ne serrez pas trop les deux écrous (D).

10. Soulevez le support du roulement pour le dégager de son ancrage et retirez l'ensemble du vérin en le reculant vers la tête du lit.
11. Réinstallez le nouveau vérin en inversant les étapes précédentes et suivez les instructions suivantes pour bien ajuster la course du vérin de tête :
 - a. Installez temporairement la manivelle et tournez-la jusqu'à ce que la section de tête repose sur le châssis. Lorsque la section de cuisse atteint le châssis, la position de la manivelle devrait normalement être verticale ou proche de cette position.
 - b. Installez définitivement la manivelle en vous assurant que la poignée de la manivelle soit en bas au moment de l'installation.

Remarque

Le réglage de la course du vérin est correct lorsque la poignée est positionnée verticalement ou presque au moment où la section de tête atteint le châssis et y repose.

12. Vérifiez l'ajustement du vérin en relevant puis en abaissant la section de tête avant de retourner le lit en service.

Procédures d'entretien

PROCÉDURE DE REMPLACEMENT - VÉRIN DE LA SECTION DE CUISSE

Remarque

Si le lit est muni de l'option antivol, référez-vous au tableau à la [page 14](#).

Outils nécessaires :

Câbles élastiques
Clé mixte 7/16"

Tournevis Phillips
Douille 7/16"

Pince à long bec
Clé à cliquet 3/8"

Procédure :

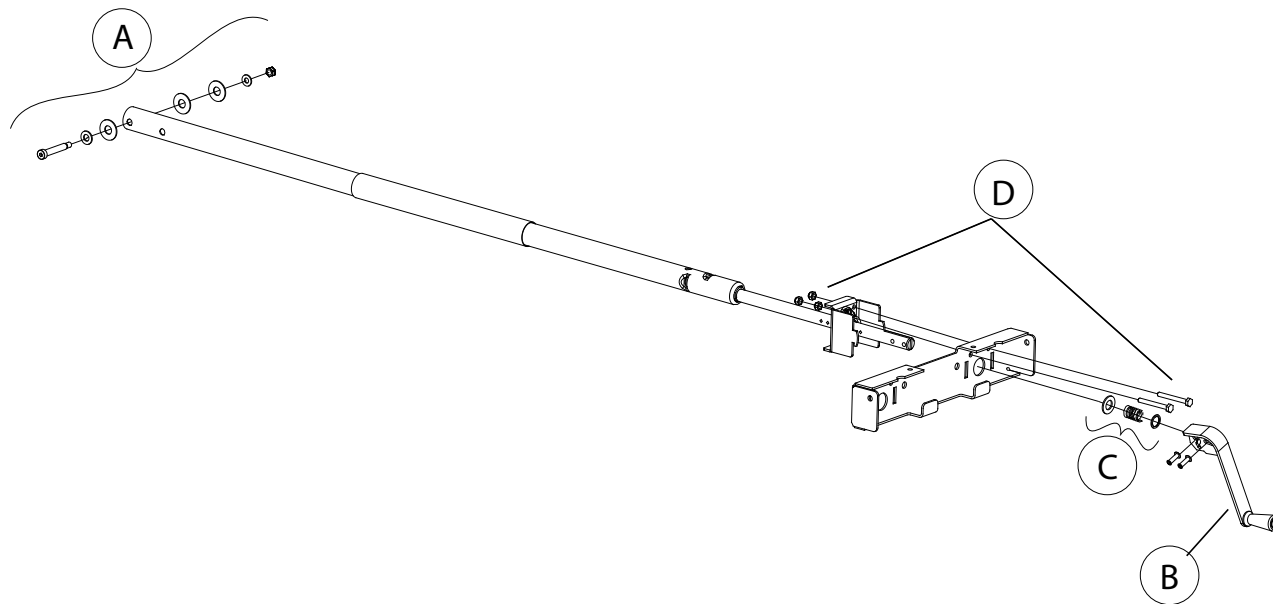


Figure 3.2E

1. Montez le lit complètement et appliquez les freins. Retirez le panneau de pied.
2. Soulevez la section de pied, rabattez-la vers la tête du lit et attachez-la au lit à l'aide d'un câble élastique. La section de cuisse doit être à l'horizontal.
3. À l'aide d'un tournevis Phillips, retirez les 4 vis fixant la plaque de recouvrement de pied au châssis du lit.
4. Soutenez le tube du vérin à l'aide d'un câble élastique passé sous le tube et accroché de chaque côté du châssis.
5. Retirez le couvercle de la boîte de pied (voir les étapes 2 et 3 de la «Procédure de remplacement - manivelle», [page 26](#)).
6. Retirez la manivelle (B) (voir les étapes 4 et 5 de la «Procédure de remplacement - manivelle», [page 26](#)). Retirez et conservez les deux rondelles de nylon et le ressort (C).

Remarque

N'oubliez pas de remettre en place les rondelles et le ressort avant de replacer la manivelle.

Procédures d'entretien

PROCÉDURE DE REMPLACEMENT - VÉRIN DE LA SECTION DE CUISSE (SUITE)

7. À l'aide de la clé 1/2" et de la clé Allen 5/32", démontez la rondelle, les boulons et l'écrou (A) retenant la section de cuisse au tube de vérin de cuisse.

Remarque

Au moment de la réinstallation du nouveau vérin de cuisse, tournez tranquillement le tube dans l'une ou l'autre direction pour aligner ses trous avec ceux du levier de la section de cuisse.

8. À l'aide d'une douille 7/16", d'une clé à cliquet 7/16" et d'une clé mixte 7/16", retirez les deux écrous et boulons (D) retenant l'assemblage du vérin de cuisse.

Remarque

Ne resserrez pas trop les deux écrous (D).

9. Soulevez le support du roulement pour le dégager de son ancrage et retirez l'ensemble du vérin en le reculant vers la tête du lit.
10. Réinstallez le nouveau vérin de cuisse en inversant les étapes précédentes et suivez les instructions suivantes pour bien l'ajuster :
 - a. Installez temporairement la manivelle et tournez-la pour lever la section de cuisse puis redescendez la section jusqu'à ce qu'elle repose sur le châssis. Lorsque la section de cuisse atteint le châssis, la position de la manivelle devrait normalement être verticale ou proche de cette position.
 - b. Installez définitivement la manivelle en vous assurant que la poignée de la manivelle est en bas au moment de l'installation.

Remarque

Le réglage de la course du vérin est correct lorsque la poignée est positionnée verticalement ou presque au moment où la section de tête atteint le châssis et y repose.

11. Vérifiez l'ajustement en relevant puis en abaissant la section de cuisse avant de retourner le lit en service.

Procédures d'entretien

LUBRIFICATION DE LA VIS DES VÉRINS DE LA SECTION DE TÊTE ET DE LA SECTION DE CUISSE

Remarque

Si le lit est muni de l'option antivol, référez-vous au tableau à la [page 14](#).

Outils nécessaires :

- Tournevis Phillips
- Câbles élastiques
- Graisse OG 2
- Pinceau à graisse

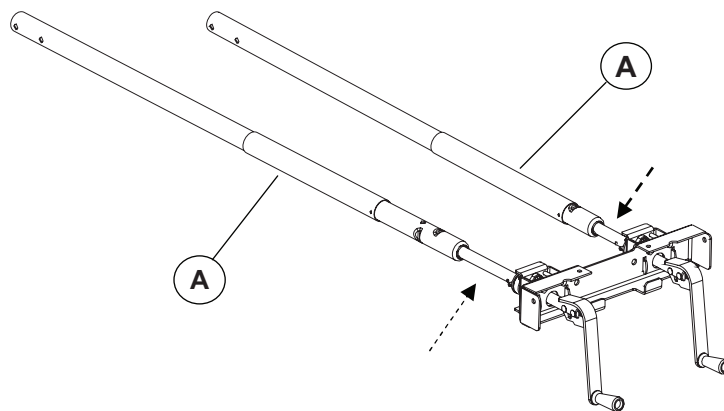


Figure 3.2F

Procédure :

1. Montez le lit complètement et appliquez les freins.
2. Montez la section de tête complètement (dans cette position, le vérin de tête atteindra son extension maximum) et mettez la section de cuisse en position horizontale (dans cette position, le vérin de cuisse atteindra son extension maximum).
3. Rabattez manuellement la section de pied vers la tête du lit et attachez-la à l'aide de câbles élastiques.
4. À l'aide d'un tournevis Phillips, retirez les vis retenant la plaque de recouvrement de pied au châssis.
5. Dégagez les tubes de protection en plastique gris (A) des goupilles ressort les retenant et glissez les tubes de protection vers l'arrière afin de découvrir les vis.
6. Appliquez de la graisse à l'aide d'un pinceau sur les filets des deux vis. Assurez-vous que la graisse atteint le creux des filets et remettez les tubes de protection en place. Remplacez la plaque de recouvrement.
7. Retirez les câbles élastiques et remettez la section de pied à sa position normale. Actionnez plusieurs fois la section de tête et de cuisse complètement afin de répandre uniformément la graisse avant de remettre le lit en service.

Procédures d'entretien

MÉCANISME D'ÉLEVATION DU LIT - REMPLACEMENT DE L'ÉCROU MOULÉ ET/OU DE LA VIS DE PIED

Remarque

Si le lit est muni de l'option antivol, référez-vous au tableau à la [page 14](#).

Outils nécessaires :

2 chandelles
Tournevis Phillips
Clé à cliquet 3/8"
Marteau caoutchouc
Ciment à filet - force moyenne (pourpre)

Câbles élastiques
Marteau
Poinçon 7/32"
Douille 1/2"

Clé mixte 1/2"
Clé mixte 9/16" (2)
Clé Allen 1/8"
Clé Allen 1/16"

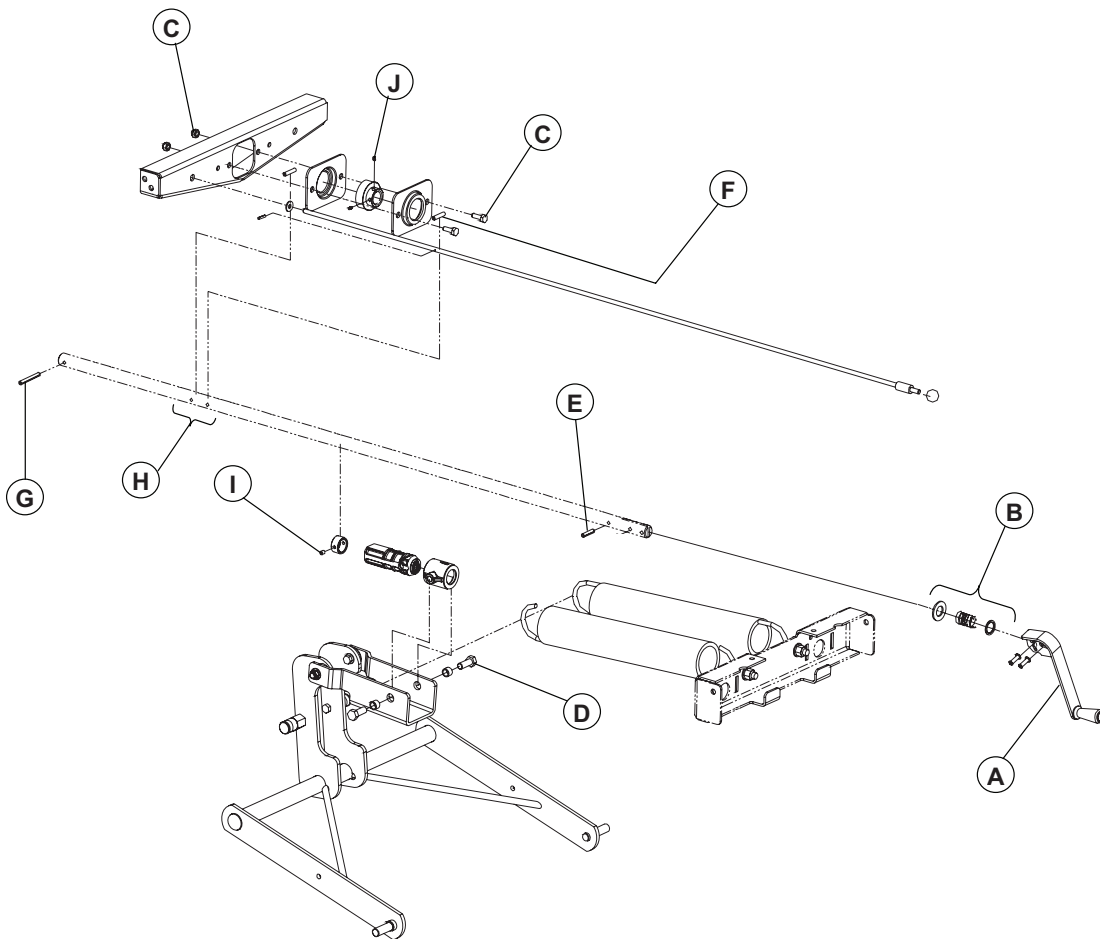


Figure 3.3A

Procédure :

1. Montez le lit complètement et appliquez les freins. Retirez le panneau de pied.
2. Montez la section de cuisse complètement. Soulevez la section de pied, rabattez-la vers la tête du lit et attachez-la au lit à l'aide d'un câble élastique.
3. À l'aide d'un tournevis Phillips, retirez les 4 vis fixant la plaque de recouvrement de pied au châssis du lit.
4. Placez 2 chandelles sous les deux balanciers du lit.
5. Baissez le lit jusqu'à ce qu'il repose sur les 2 chandelles.

Procédures d'entretien

MÉCANISME D'ÉLÉVATION DU LIT - REMPLACEMENT DE L'ÉCROU MOULÉ ET/OU DE LA VIS DE PIED (SUITE)

6. Retirez le couvercle de la boîte de pied (voir les étapes 2 et 3 de la «Procédure de remplacement - manivelle», [page 26](#)).
7. Retirez la manivelle (A) (voir les étapes 4 et 5 de la «Procédure de remplacement - manivelle», [page 26](#)). Retirez et conservez les deux rondelles de nylon et le ressort (B).

Remarque

N'oubliez pas de remettre en place les rondelles et le ressort avant de replacer la manivelle.

8. À l'aide d'une clé à cliquet 3/8", d'une douille 1/2" et d'une clé mixte 1/2", retirez les deux écrous et boulons (C) retenant les supports du roulement au châssis.
9. Retirez à l'aide de deux clés mixtes 9/16", les 2 boulons (D) retenant l'écrou et son support au harnais d'élévation.

Remarque

Remettez du ciment à filet de force moyenne (pourpre) sur la portion de la nouvelle vis et de la vis de pression avant de remettre le palier sur la vis et de serrer la vis de pression parcourue par l'écrou.

10. À l'aide d'un poinçon 7/32" et d'un marteau, enlevez la goupille à ressort (E) de la vis. Retirez l'assemblage de la vis de pied de sa position et déposez le tout sur un établi.
11. Retirez toutes les autres goupilles à ressort (F, G et H).
12. À l'aide d'une clé Allen 1/16", desserrez la vis de pression (I) maintenant en place la butée de fin de course et retirez celle-ci de la vis.
13. À l'aide d'une clé Allen 1/8", desserrez les deux vis de pression (J) maintenant en place le roulement. Dégagez et retirez le roulement de la vis en utilisant un marteau en caoutchouc car du ciment à filet a été utilisé à l'assemblage pour maintenir le roulement en place.

Remarque

Remettez du ciment à filet de force moyenne (pourpre) sur la portion de la nouvelle vis et de la vis de pression avant de remettre le palier sur la vis et de serrer la vis de pression parcourue par l'écrou.

14. Retirez l'écrou défectueux de la vis. Remplacez le nouvel écrou sur la vis.
15. Réinstallez toutes les composantes de la vis de pied, à l'exception de la goupille à ressort (E).
16. Réinstallez la nouvelle vis sur le mécanisme d'élévation en inversant les étapes précédentes telles que décrites ci-dessous :
 - a. Réinstallez la goupille à ressort (E).
 - b. Réinstallez la manivelle (A) (voir les étapes 6 et 7 de la «Procédure de remplacement - manivelle», [page 26](#)).
 - c. Refermez le couvercle de la boîte de pied.
 - d. Remettez du ciment à filet de force moyenne sur le bouton de la manette de positionnement *Trendelenburg* et réinstallez-le.
 - e. Remettez la plaque de recouvrement de pied au châssis du lit en vissant les 4 vis.
17. Vérifiez la fonction d'élévation du lit avant de le remettre en service.

Procédures d'entretien

BASE - PÉDALE DE FREIN/DIRECTION

Remarque

Si le lit est muni de l'option antivol, référez-vous au tableau à la [page 14](#).

Outils nécessaires :

- Douille 1/2"
- Marteau caoutchouc
- Clé dynamométrique
- Clé à cliquet 3

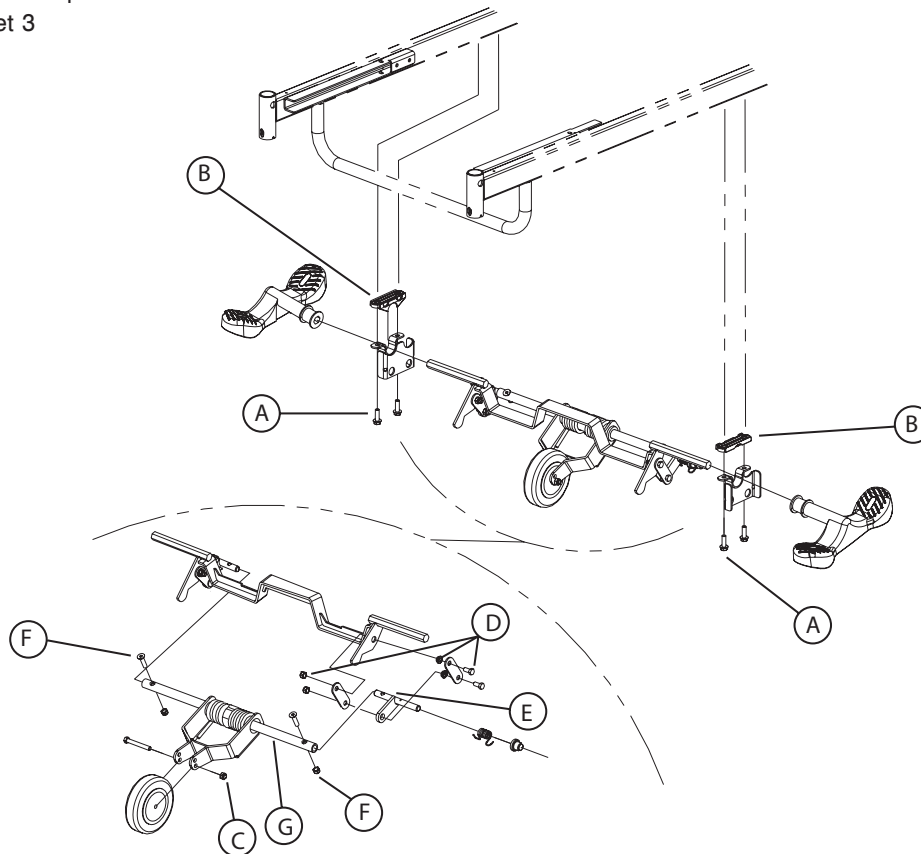


Figure 3.4A

Procédure :

1. Montez le lit complètement et appliquez les freins.
2. Placez la pédale de frein/direction au neutre.
3. À l'aide d'une douille 1/2", retirez les deux boulons (A) retenant le support de 5^e roue (en option) ou le support de balancier (A, Figure 3.4B, [page 37](#)) du côté de la pédale à remplacer et déposez le support. Récupérez l'espaceur moulé (B).

Remarque

Une fois enlevés, les boulons à filet roulant doivent d'abord être réinstallés manuellement, puis serrés à un couple de 135 lb/po (14.7 Nm) à l'aide d'une clé dynamométrique.

4. Retirez la pédale de la tige du levier d'actionnement. Utilisez un marteau caoutchouc si nécessaire.
5. Inversez les étapes précédentes pour installer la nouvelle pédale.

[Retour à la table des matières](#)

Procédures d'entretien

BASE - ROULETTE DE LA 5^E ROUE (EN OPTION)

Remarque

Si le lit est muni de l'option antivol, référez-vous au tableau à la [page 14](#).

Outils nécessaires :

- Clé mixte 1/2" (2)

Procédure :

Remarque

À moins d'indications contraires, référez-vous à la figure 3.4A, [page 34](#) pour l'illustration des références contenues dans la procédure de remplacement qui suit.

1. Montez le lit complètement et appliquez les freins.
2. Placez la pédale de frein/direction au neutre.
3. À l'aide de deux clés mixtes 1/2", retirez l'écrou et le boulon (C) retenant la roulette au bras plongeant.
4. Inversez les étapes précédentes pour installer la nouvelle roulette.

BASE - ENSEMBLE DE LA 5^E ROUE (EN OPTION)

Outils nécessaires :

- Clé mixte 1/2"
- Douille 1/2"
- Marteau caoutchouc
- Clé à cliquet 3/8"

Procédure :

Remarque

À moins d'indications contraires, référez-vous à la figure 3.4A, [page 34](#) pour l'illustration des références contenues dans la procédure de remplacement qui suit.

1. Montez le lit complètement et appliquez les freins.
2. Placez la pédale de frein/direction au neutre.
3. À l'aide d'une clé à cliquet 1/2", retirez les deux écrous, rondelles, entretoises à épaulement et boulons (F1, Figure 3.4B, [page 37](#)) reliant l'extrémité des barres de liaison aux leviers de blocage, du côté des pédales. Pour un lit équipé du système de freinage aux quatre roues (en option), retirez aussi la boulonnerie reliant l'extrémité des deux barres de liaison aux mêmes leviers de blocage.
4. À l'aide d'une clé à cliquet 1/2", retirez les quatre boulons (A) retenant les deux supports de 5^e roue à la base. Récupérez les espaceurs moulés (B). Retirez le mécanisme complet.
5. Retirez les deux pédales de frein/direction des tiges du levier d'activation. Utilisez un marteau caoutchouc si nécessaire.
6. Retirez et récupérez les deux leviers de blocage (C, Figure 3.4B, [page 37](#)).
7. Inversez les étapes précédentes pour installer le nouvel ensemble de la 5^e roue.
8. Vérifiez le fonctionnement de la 5^e roue avant de remettre le lit en service.

Procédures d'entretien

BASE - ENSEMBLE DU BRAS PLONGEANT DE LA 5^E ROUE (EN OPTION)

Remarque

Si le lit est muni de l'option antivol, référez-vous au tableau à la [page 14](#).

Outils nécessaires :

- Douille 1/2"
- Clé mixte 1/2" (2)
- Clé Allen 3/16"
- Clé à cliquet 3/8"

Procédure :

Remarque

À moins d'indications contraires, référez-vous à la figure 3.4A, [page 34](#) pour l'illustration des références contenues dans la procédure de remplacement qui suit.

1. Montez le lit complètement et appliquez les freins.
2. Placez la pédale de frein/direction au neutre.
3. À l'aide d'une douille 1/2", retirez les deux boulons (A) retenant le support gauche ou droit de la 5^e roue à la base. Déposez le support au sol et récupérez l'espaceur moulé (B).
4. À l'aide de deux clés mixtes 1/2", retirez l'écrou, les entretoises à épaulement et le boulon (D) retenant le levier de torsion (E) à la partie inférieure du contre-levier.
5. À l'aide d'une clé mixte 1/2" et d'une clé Allen 3/16", retirez les deux écrous et vis Allen (F) retenant les deux leviers de torsion (E) de chaque côté de l'arbre de levier (G).

Remarque

À l'assemblage, vissez d'abord à fond les vis Allen avant de visser les écrous.

6. Dégagez l'ensemble du bras plongeant des leviers de torsion et retirez-le.
7. À l'aide de deux clés mixtes 1/2", retirez l'écrou et le boulon (C) retenant la roulette au bras plongeant et conservez-la pour le nouvel ensemble.
8. Inversez les étapes précédentes pour installer le nouvel ensemble du bras plongeant.
9. Vérifiez le fonctionnement de la 5^e roue avant de remettre le lit en service.

Procédures d'entretien

ROULETTE DU LIT

Remarque

Si le lit est muni de l'option antivol, référez-vous au tableau à la [page 14](#).

Outils nécessaires :

- Chandelle
- Clé mixte 1/2"
- Tournevis Phillips

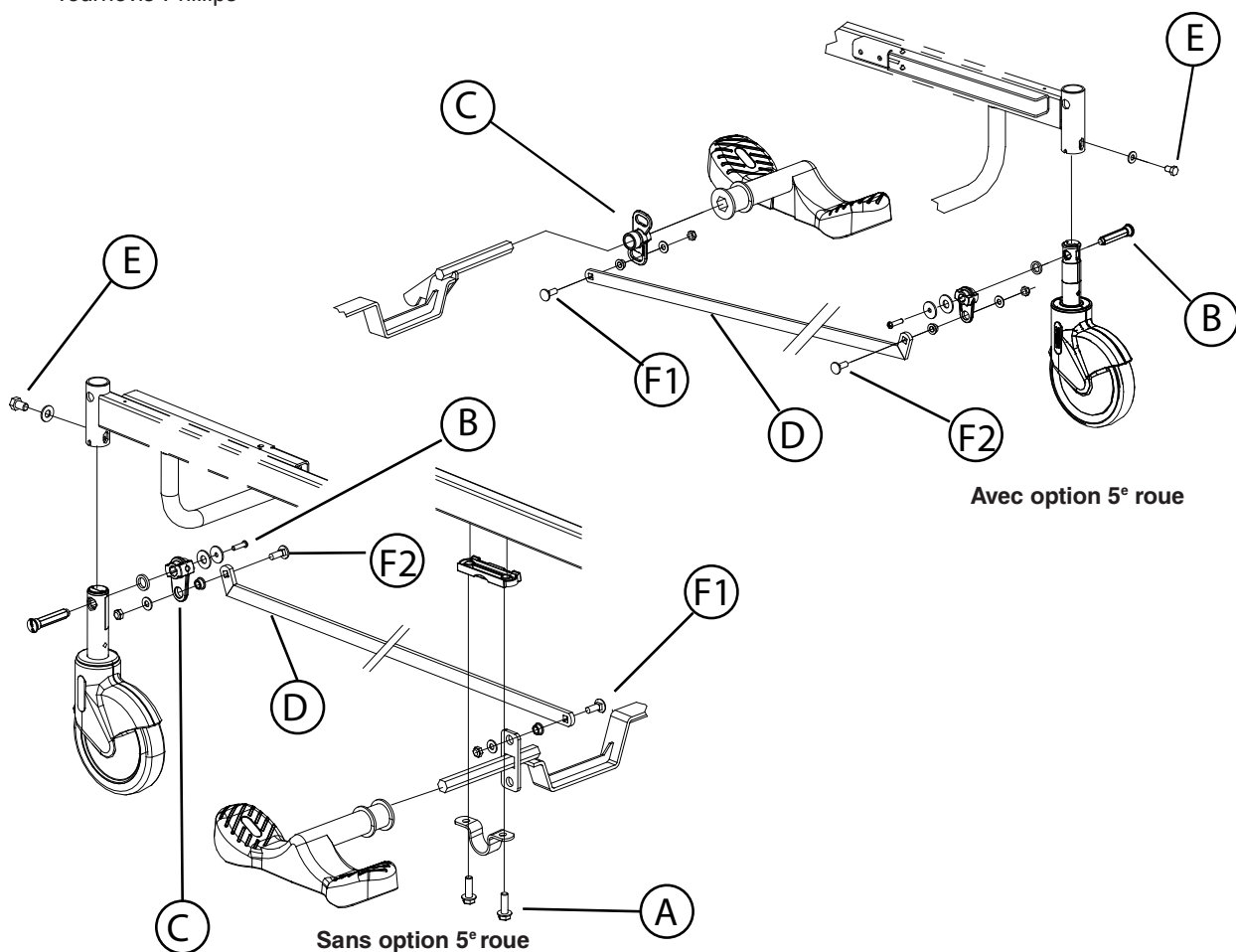


Figure 3.4B


Procédure :

1. Montez le lit complètement et appliquez les freins.
2. Mettez la pédale de frein/direction au neutre.
3. Placez une chandelle sous le châssis du côté de la roulette à changer.
4. Descendez le lit jusqu'à ce que la roulette soit au moins à six pouces du sol.
5. Si la roue fait partie du mécanisme de freinage, retirez, à l'aide du tournevis Phillips, les rondelles et l'axe de blocage (B) reliant la tige de la roulette au levier de blocage (C) et à la barre de liaison (D).

[Retour à la table des matières](#)

Procédures d'entretien

ROULETTE DU LIT (SUITE)

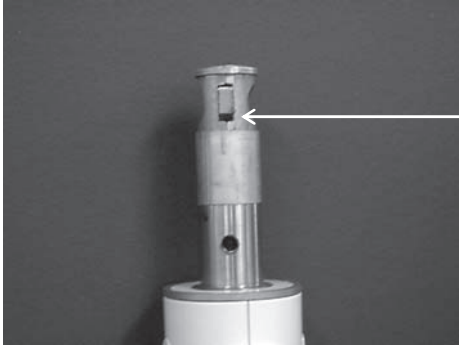

Remarque

La tige d'une roulette faisant partie du mécanisme de freinage doit être orientée correctement avant de l'installer sur la base. L'illustration ci-contre montre le côté de la tige qui doit faire face à l'intérieur du lit : c'est le côté présentant la plus large ouverture sous la came en position neutre.

7. À l'aide d'une clé 1/2", retirez le boulon et les rondelles (E) retenant la roulette à la base.

Remarque

Au moment de serrer définitivement le boulon (E), assurez-vous que la tige de la roulette est complètement enfoncée dans la douille de montage.

8. Inversez les étapes précédentes pour installer la nouvelle roulette.
9. Dans le cas où la nouvelle roulette fait partie du mécanisme de freinage, appliquez les freins et vérifiez qu'elle se verrouille bien avant de remettre le lit en service.

BARRE DE LIAISON DU MÉCANISME DE FREINAGE

Outils nécessaires :

- Clé mixte 1/2"

Procédure :

Remarque

À moins d'indications contraires, référez-vous à la figure 3.4B, [page 37](#) pour l'illustration des références contenues dans la procédure de remplacement qui suit.

1. Montez le lit complètement et appliquez les freins.
2. À l'aide d'une clé mixte 1/2", retirez l'écrou, l'entretoise à épaulement, la rondelle et le boulon (F1, F2) retenant chaque extrémité de la barre de liaison.
3. Retirez la barre de liaison défectueuse.
4. Inversez les étapes précédentes pour installer la nouvelle barre de liaison.
5. Vérifiez le mécanisme de freinage avant de remettre le lit en service.

ROULETTE DU LIT AVEC FREINAGE INTÉGRÉ

Remarque

Si le lit est muni de l'option antiviol, référez-vous au tableau à la [page 14](#).

Outils nécessaires :

- Clé 1/2"

Procédure :


1. Montez le lit complètement et appliquez les freins.
2. Mettez la pédale de frein/direction au neutre.
3. Placez une chandelle sous le châssis du côté de la roulette à changer.
4. Descendez le lit jusqu'à ce que la roulette soit au moins à six pouces du sol.
5. Si la roue fait partie du mécanisme de freinage, retirez, à l'aide du tournevis Phillips, les rondelles et l'axe de blocage (B) reliant la tige de la roulette au levier de blocage (C) et à la barre de liaison (D).
6. Retirez le boulon (A) à l'aide de la clé 1/2".
7. Retirez la roulette défectueuse.
8. Remontez la nouvelle roulette en suivant les étapes précédentes en sens inverse et vérifiez la fonctionnalité du système de freinage.

Notes

Base

Référence seulement : L23-029

Rév. 00

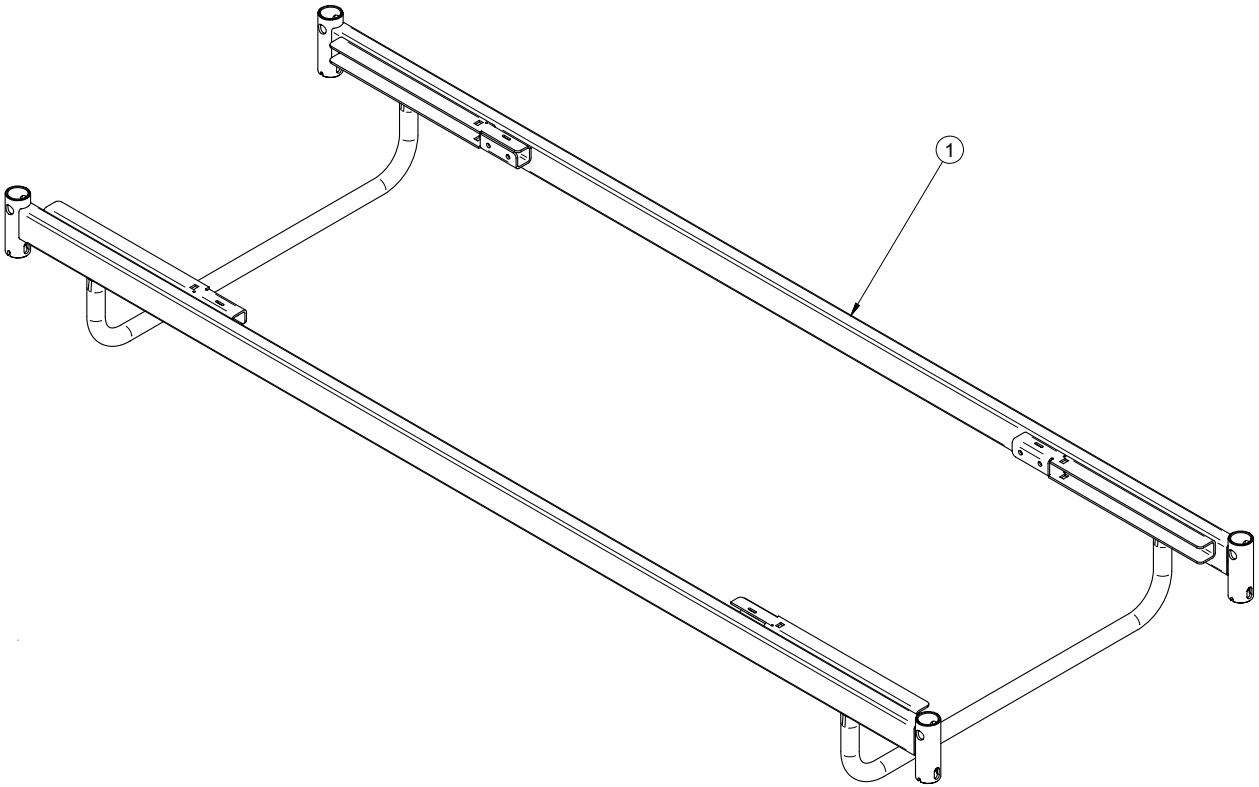

Base (Référence seulement : L23-029G, Rév. 00)


Item	Numéro de pièce	Description	Quantité
1	25-0108G	S.A. Base	1

[Retour à la table des matières](#)

Lit sur pattes 6"

Référence seulement : OL230163

Rév. 03

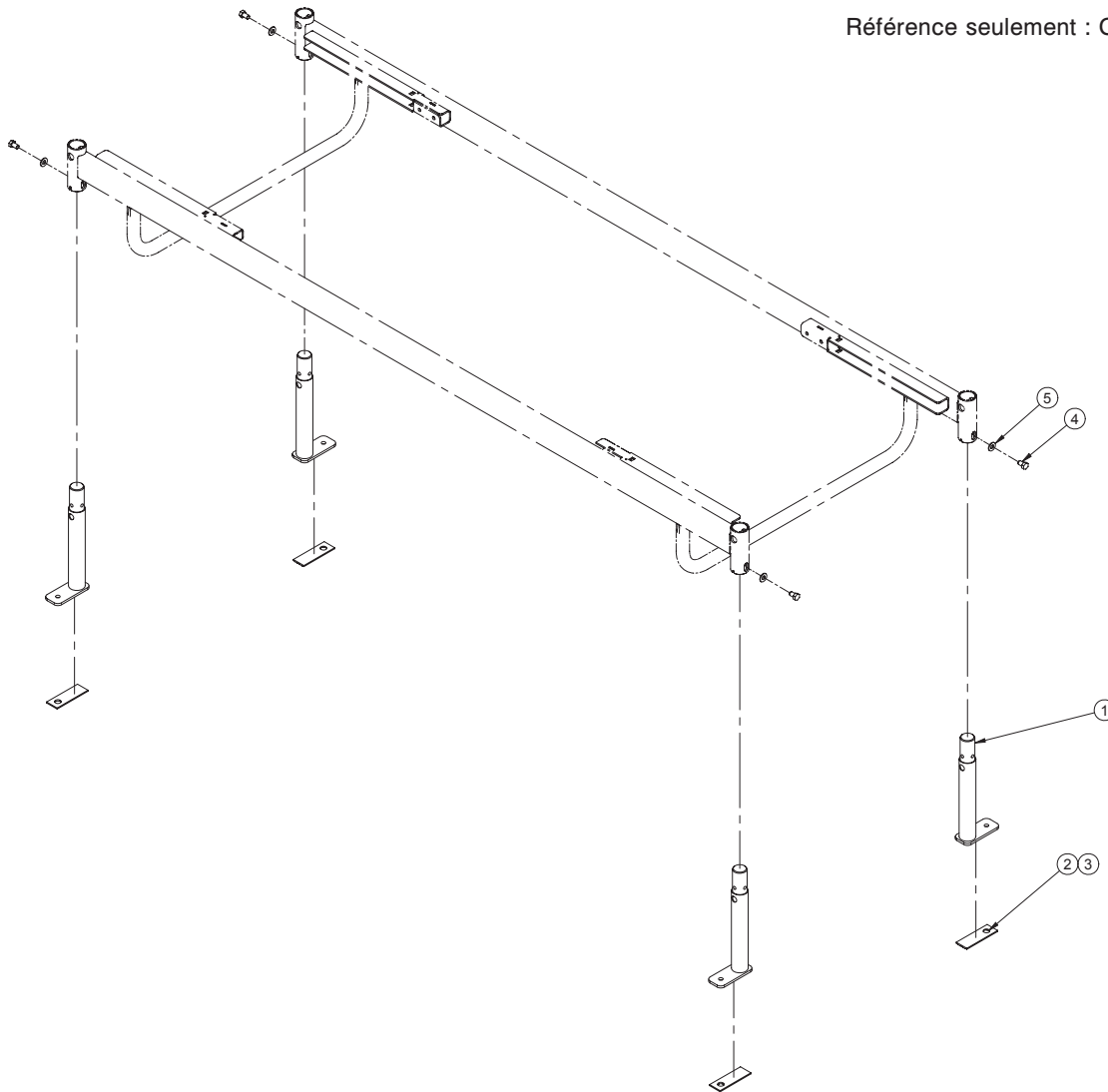

Lit sur pattes 6" (Référence seulement : OL230163G, Rév. 03)


Item	Numéro de pièce	Description	Quantité
1	23-0748G	S.A. Patte de fixation	4
2	23-0462	Semelle	4
3	M0005	Colle cyanoacrylate #TB1743-1	0.0150 kg
4	VB15A1O16-S	Boulon 5/16-18 x 1/2" grade 5 - Scotch Grip p.z.	4
5	VW10A10	Rondelle plate dia. 5/16" SAE p.z.	4

Lit sur pattes 6" (Référence seulement : OL230163G-T, Rév. 03) (option antivol)

Item	Numéro de pièce	Description	Quantité
1	23-0748G	S.A. Patte de fixation	4
2	23-0462	Semelle	4
3	M0005	Colle cyanoacrylate #TB1743-1	0.0150 kg
4	VVB3A1O16-S	Vis mécanique tête pan torx 5/16-18 x 1/2" grade 5 - Scotch Grip 4	4
5	VW10A10	Rondelle plate dia. 5/16" SAE p.z.	4

Mécanisme de freinage sans 5^e roue

Référence seulement : OL230273
Rév. 02

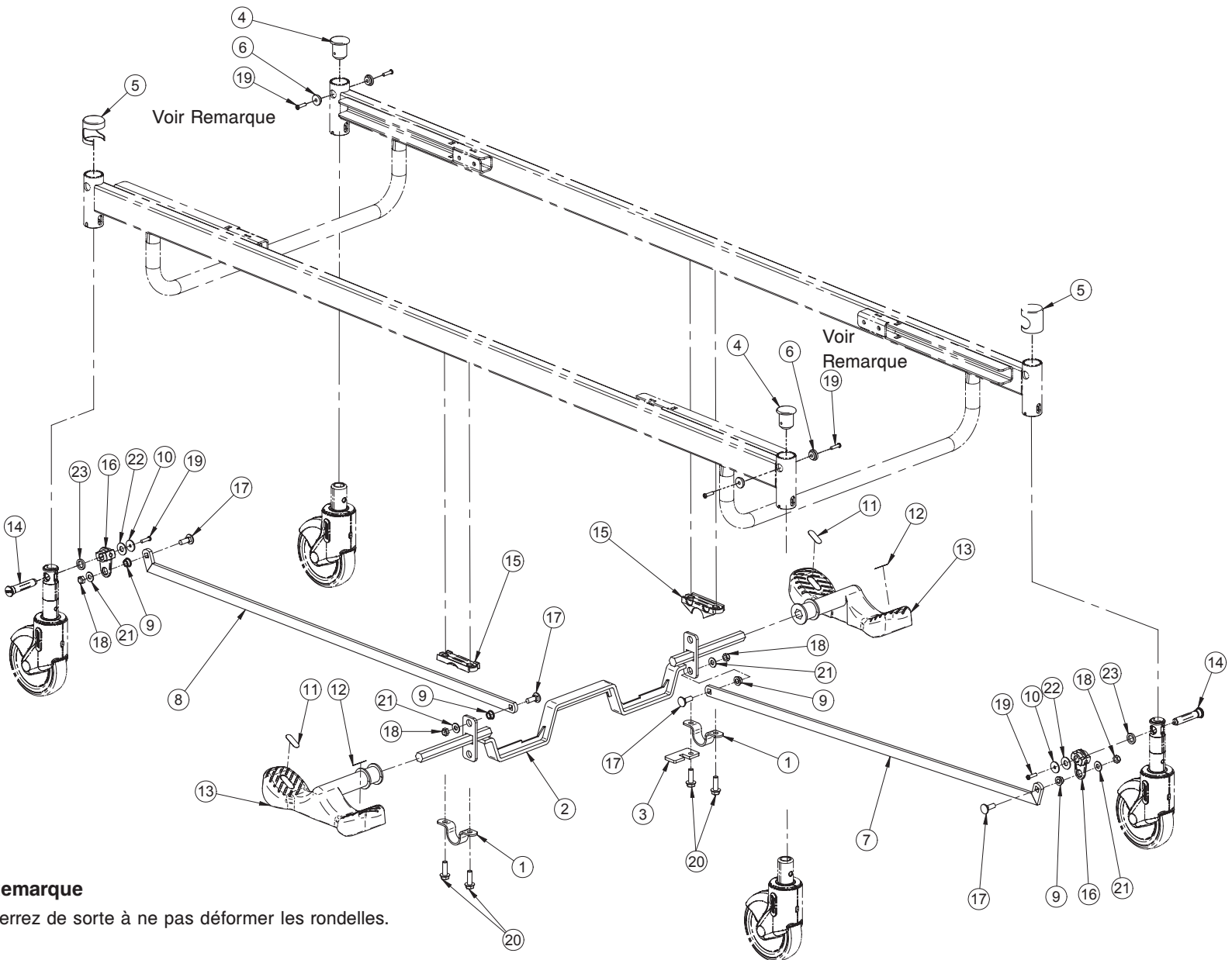

Remarque

Serrez de sorte à ne pas déformer les rondelles.

Mécanisme de freinage sans 5^e roue

Mécanisme de freinage sans 5^e roue (Référence seulement : OL230273G, Rév. 02)

Item	Numéro de pièce	Description	Quantité
1	14662Z	Support de balancier	2
2	23-0327G	S.A. Axe de freinage	1
3	23-0333Z	Butée de freinage directionnelle	1
4	23-0856G	Bouchon de base	2
5	23-0857G	Bouchon de base	2
6	23-0858	Rondelle à épaulement	4
7	25-0291G	S.A. Barre de liaison - pied	1
8	25-0292G	S.A. Barre de liaison - tête	1
9	QPA25-0340	Entretoise 5/16 x 3/16	4
10	23-0872Z	Rondelle de retenue	2
11	QE71-0496	Autocollant 5 ^e roue (vert)	2
12	QE71-0511	Autocollant frein (rouge)	2
13	QP23-0627	Pédale papillon	2
14	QPA23-0853	Axe de blocage fileté	2
15	QPA25-0312	Espaceur moulé	2
16	QPA25-0411	Levier de freinage	2
17	VB35A1028FT	Boulon de carrosserie 5/16-18 x 7-8" grade 5 p.z. long cou	4
18	VE79A1O	Écrou indesserrable 5/16-18 UNC grade C	4
19	VV33A0G24	Vis mécanique tête pan Phillips 10-32 x 3/4" LG	6
20	VVB4A1O32	Boulon 5/16-18 x 1" filet roulant	4
21	VW10A10	Rondelle plate diamètre 5/16" S.A.E.	4
22	VW10C122802	Rondelle nylon 3/8" int. x 7/8" ext. x 1/16" ép.	2
23	VW10C162404	Rondelle nylon 0.505" int. x 3/4" ext. x 1/8" ép.	2

Mécanisme de freinage sans 5^e roue (option antivol)


Mécanisme de freinage sans 5^e roue (Référence seulement : OL230273G-T, Rév. 02) (option antivol)

Item	Numéro de pièce	Description	Quantité
1	14662Z	Support de balancier	2
2	23-0327G	S.A. Axe de freinage	1
3	23-0333Z	Butée de freinage directionnelle	1
4	23-0856G	Bouchon de base	2
5	23-0857G	Bouchon de base	2
6	23-0858	Rondelle à épaulement	4
7	25-0291G	S.A. Barre de liaison - pied	1
8	25-0292G	S.A. Barre de liaison - tête	1
9	QPA25-0340	Entretoise 5/16 x 3/16	4
10	23-0872Z	Rondelle de retenue	2
11	QE71-0496	Autocollant 5 ^e roue (vert)	2
12	QE71-0511	Autocollant frein (rouge)	2
13	QP23-0627	Pédale papillon	2
14	QPA23-0853	Axe de blocage fileté	2
15	QPA25-0312	Espaceur moulé	2
16	QPA25-0411	Levier de freinage	2
17	VB35A1028FT	Boulon de carrosserie 5/16-18 x 7-8" grade 5 p.z. long cou	4
18	VE79A1O	Écrou indesserrable 5/16-18 UNC grade C	4
19	VVB3A0G24-S	Vis mécanique tête pan torx 10-32 x 3/4" LG (antivol)	6
20	VVB4A1O32	Boulon 5/16-18 x 1" filet roulant	4
21	VW10A10	Rondelle plate diamètre 5/16" S.A.E.	4
22	VW10C122802	Rondelle nylon 3/8" int. x 7/8" ext. x 1/16" ép.	2
23	VW10C162404	Rondelle nylon 0.505" int. x 3/4" ext. x 1/8" ép.	2

Notes

Mécanisme de freinage avec 5^e roue

Référence seulement : OL230274
Rév. 02

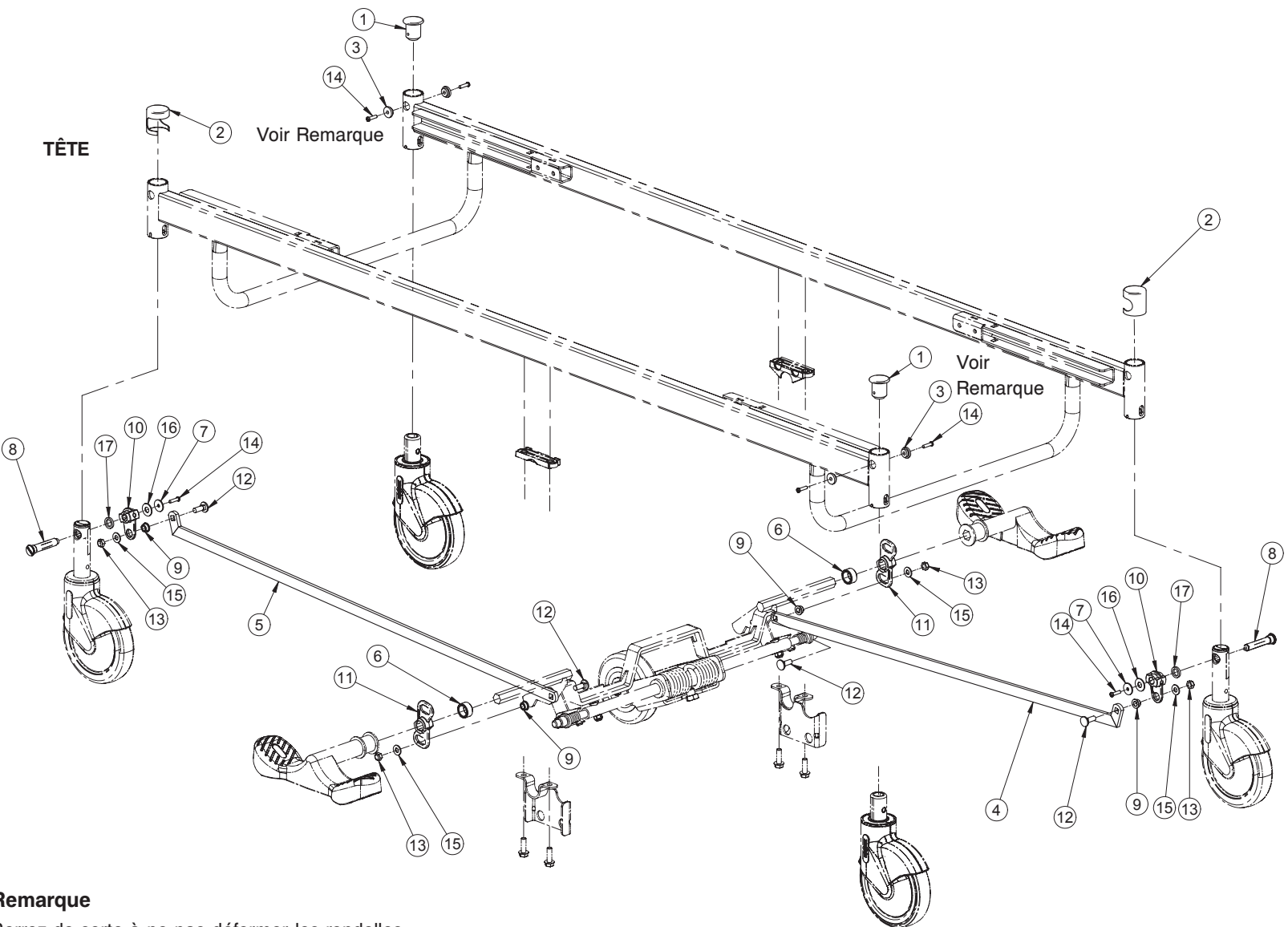

Remarque

Serrez de sorte à ne pas déformer les rondelles.

Mécanisme de freinage avec 5^e roue

Mécanisme de freinage avec 5e roue (Référence seulement : OL230274G, Rév. 02)

Item	Numéro de pièce	Description	Quantité
1	23-0856G	Bouchon de base	2
2	23-0857G	Bouchon de base	2
3	23-0858	Rondelle à épaulement	4
4	25-0291G	S.A. Barre de liaison - pied	1
5	25-0292G	S.A. Barre de liaison - tête	1
6	25-0451	Espaceur de levier	2
7	23-0872Z	Rondelle de retenue	2
8	QPA23-0853	Axe de blocage fileté	2
9	QPA25-0340	Entretoises 5/16 x 3/16	4
10	QPA25-0411	Levier de freinage	2
11	QPA25-0427	Levier de blocage	2
12	VB35A1028FT	Boulon de carrosserie 5/16-18 x 7-8" grade 5 p.z. long cou	4
13	VE79A1O	Écrou ind.5/16-18 UNC grade C	4
14	VV33A0G24	Vis mécanique tête pan Phillips 10-32 x 3/4" LG	6
15	VW10A10	Rondelle plate 5/16" SAE p.z.	4
16	VW10C122802	Rondelle nylon 3/8" int. x 7/8" ext. x 1/16" ép.	2
17	VW10C162404	Rondelle nylon 0.505" int. x 3/4" ext. x 1/8" ép.	2


Mécanisme de freinage avec 5e roue (Référence seulement : OL230274G-T, Rév. 02) (option antivol)

Item	Numéro de pièce	Description	Quantité
1	23-0856G	Bouchon de base	2
2	23-0857G	Bouchon de base	2
3	23-0858	Rondelle à épaulement	4
4	25-0291G	S.A. Barre de liaison - pied	1
5	25-0292G	S.A. Barre de liaison - tête	1
6	25-0451	Espaceur de levier	2
7	23-0872Z	Rondelle de retenue	2
8	QPA23-0853	Axe de blocage fileté	2
9	QPA25-0340	Entretoises 5/16 x 3/16	4
10	QPA25-0411	Levier de freinage	2
11	QPA25-0427	Levier de blocage	2
12	VB35A1028FT	Boulon de carrosserie 5/16-18 x 7-8" grade 5 p.z. long cou	4
13	VE79A1O	Écrou ind. 5/16-18 UNC grade C	4
14	VVB3A0G24-S	Vis mécanique tête pan torx 10-32 x 3/4" LG	6
15	VW10A10	Rondelle plate 5/16" SAE p.z.	4
16	VW10C122802	Rondelle nylon 3/8" int. x 7/8" ext. x 1/16" ép.	2
17	VW10C162404	Rondelle nylon 0.505" int. x 3/4" ext. x 1/8" ép.	2

Roulettes 6" sans 5^e roue

Référence seulement : OL230048

Rév. 05

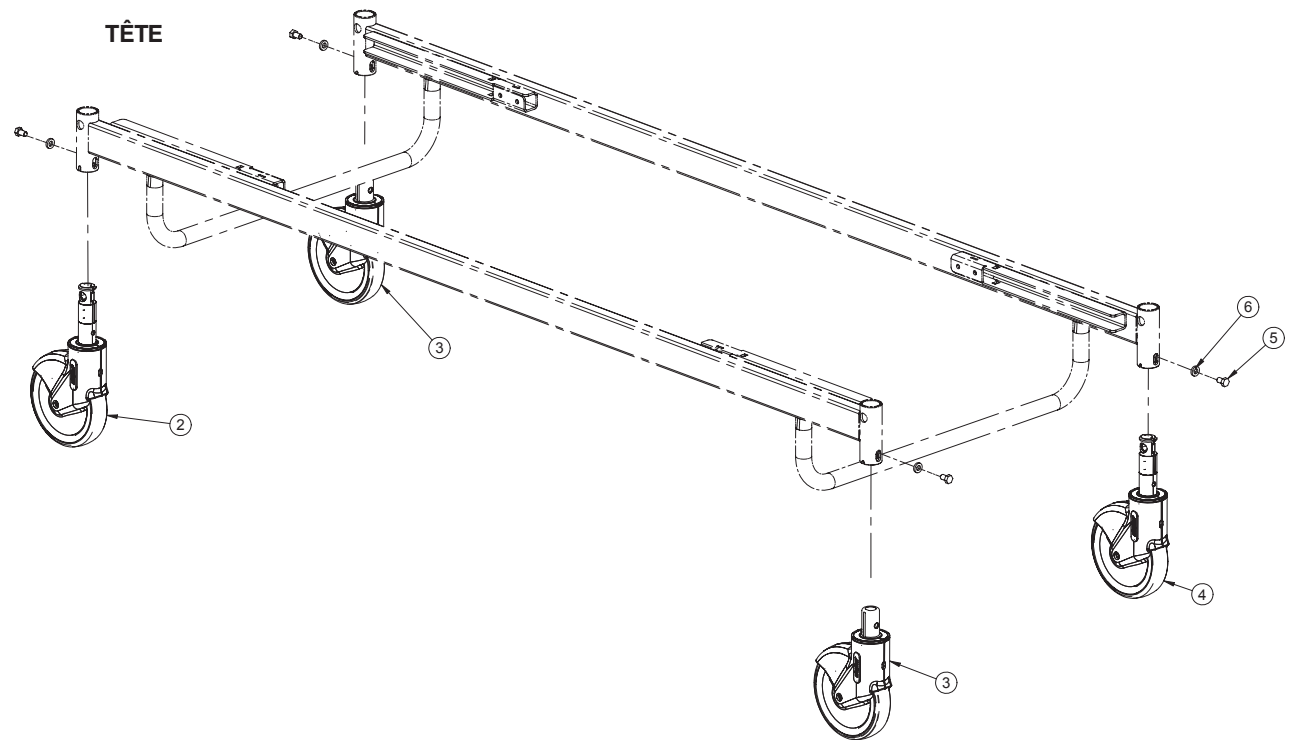

Roulettes 6" sans 5^e roue (Référence seulement : OL230048, Rév. 05)

Item	Numéro de pièce	Description	Quantité
2	RD25038807	Roulette de 6" avec frein	1
3	RD25049307	Roulette de 6" pivotante	2
4	RD25049607	Roulette de 6" directionnelle	1
5	VB15A1016-S	Boulon 5/16-18 x 1/2" grade 5	4
6	VW10A1120	Rondelle plate diamètre 5/16" S.A.E. 0.120" ép.	4

Roulettes 6" sans 5^e roue (Référence seulement : OL230048-T, Rév. 05) (option antivol)


Item	Numéro de pièce	Description	Quantité
2	RD25038807	Roulette de 6" avec frein	1
3	RD25049307	Roulette de 6" pivotante	2
4	RD25049607	Roulette de 6" directionnelle	1
5	VVB3A1016-S	Vis mécanique tête pan torx 5/16-18 x 1/2" Scotch Grip	4
6	VW10A1120	Rondelle plate diamètre 5/16" S.A.E. 0.120" ép.	4

[Retour à la table des matières](#)

Roulettes 6" avec 5^e roue

Référence seulement : OL230050

Rév. 04

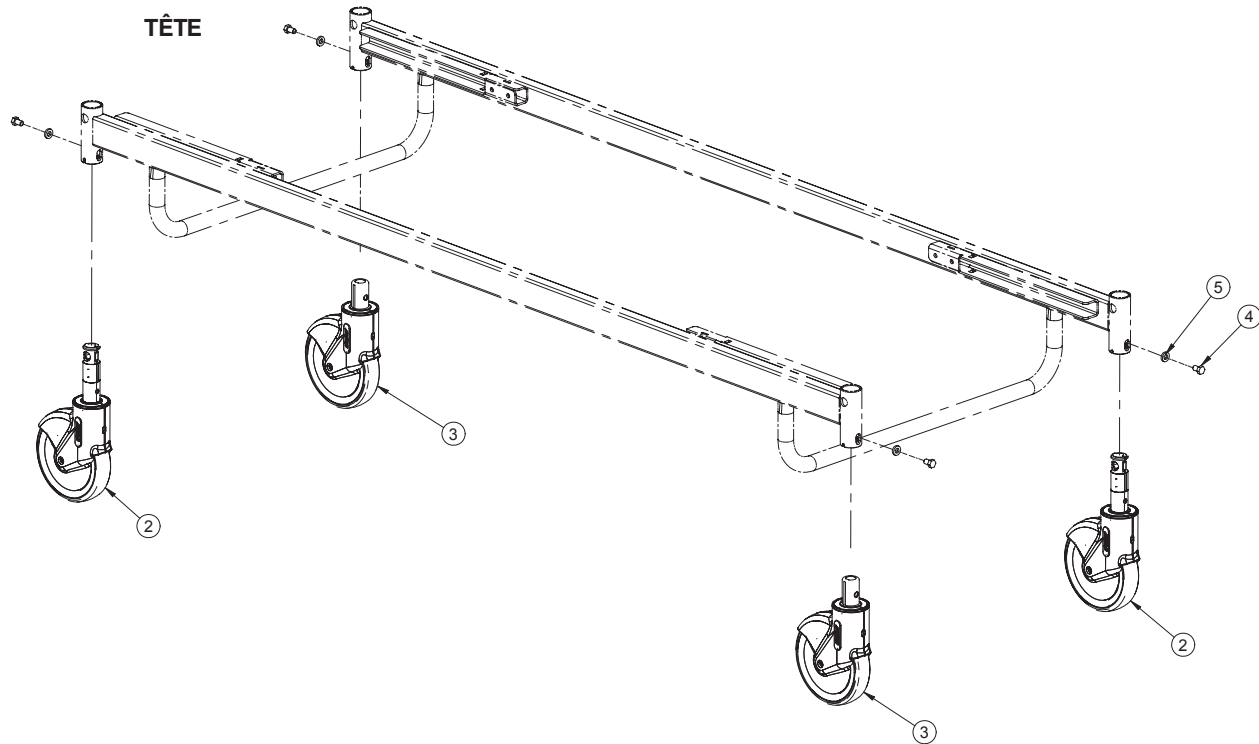

Roulettes 6" avec 5^e roue (Référence seulement : OL230050, Rév. 04)

Item	Numéro de pièce	Description	Quantité
2	RD25038807	Roulette de 6" avec frein	2
3	RD25049307	Roulette de 6" pivotante	2
4	VB15A1O16-S	Boulon 5/16-18 x 1/2" LG grade 5 Scotch Grip	4
5	VW10A1120	Rondelle plate diamètre 5/16" S.A.E. 0.120" ép.	4


Roulettes 6" avec 5^e roue (Référence seulement : OL230050-T, Rév. 04) (option antiviol)

Item	Numéro de pièce	Description	Quantité
2	RD25038807	Roulette de 6" avec frein	2
3	RD25049307	Roulette de 6" pivotante	2
4	VVB3A1O16-S	Vis mécanique tête pan torx 5/16-18 x 1/2" LG Scotch Grip	4
5	VW10A1120	Rondelle plate diamètre 5/16" S.A.E. 0.120" ép.	4

Roulettes 6" avec frein individuel

Référence seulement : OL230281

Rév. 00

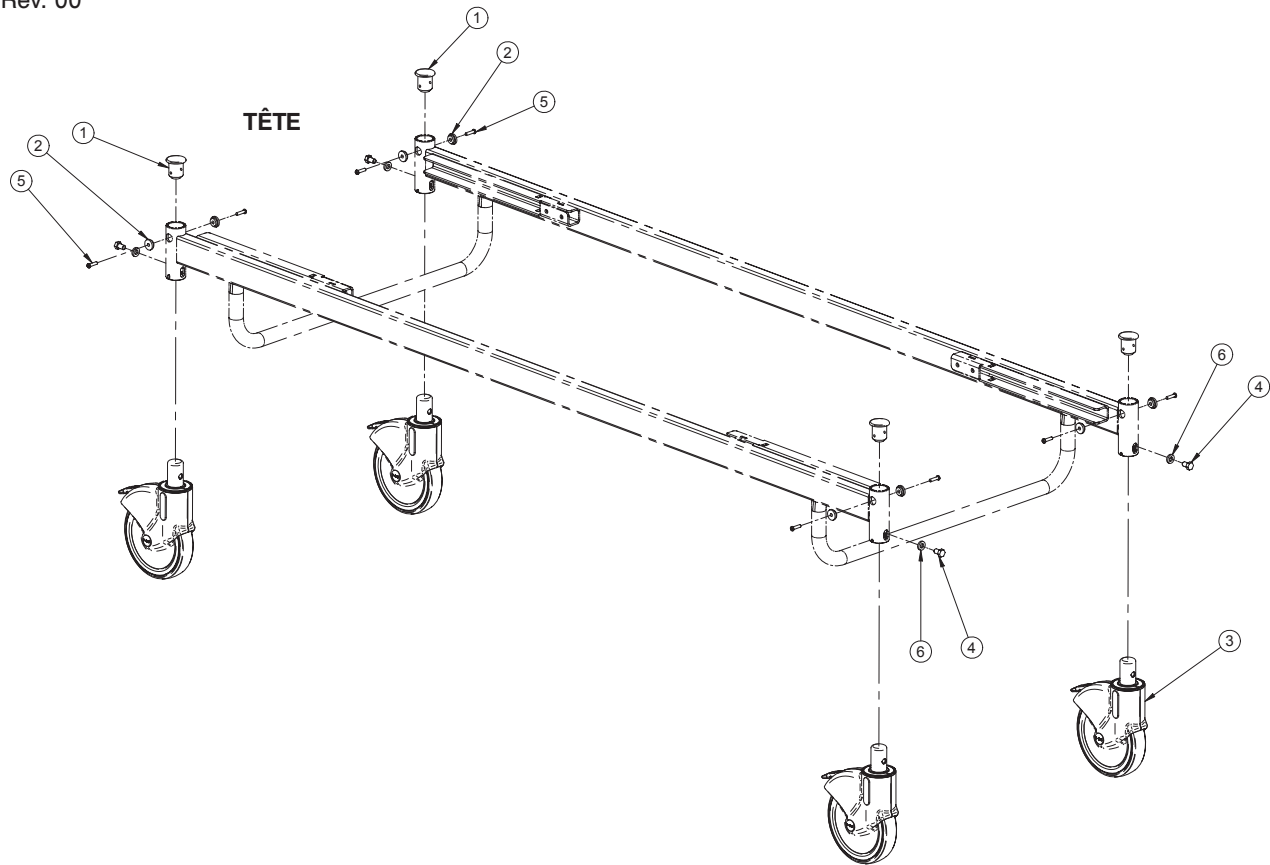

Roulettes 6" avec frein individuel (Référence seulement : OL230281, Rév. 00)

Item	Numéro de pièce	Description	Quantité
1	23-0856G	Bouchon de base	4
2	23-0858	Rondelle à épaulement	8
3	RD23084207	Roulette de 6" freinage intégré	4
4	VB15A1O16-S	Boulon 5/16-18 x 1/2" LG grade 5 Scotch Grip	4
5	VV33A0G24	Vis mécanique tête pan Phillips 10-32 x 3/4" LG	8
6	VW10A1120	Rondelle plate diamètre 5/16" S.A.E. 0.120" ép.	4

Roulettes 6" avec frein individuel (Référence seulement : OL230281-T, Rév. 00) (option antivol)


Item	Numéro de pièce	Description	Quantité
1	23-0856G	Bouchon de base	4
2	23-0858	Rondelle à épaulement	8
3	RD23084207	Roulette de 6" freinage intégré	4
4	VVB3A1O16-S	Vis mécanique tête pan torx 5/16-18 x 1/2" LG Scotch Grip	4
5	VVB3A0G24-S	Vis mécanique tête pan torx 10-32 x 3/4" LG	8
6	VW10A1120	Rondelle plate diamètre 5/16" S.A.E. 0.120" ép.	4




[Retour à la table des matières](#)

Notes

5^e roue

Référence seulement : OL2390219
Rév. 03

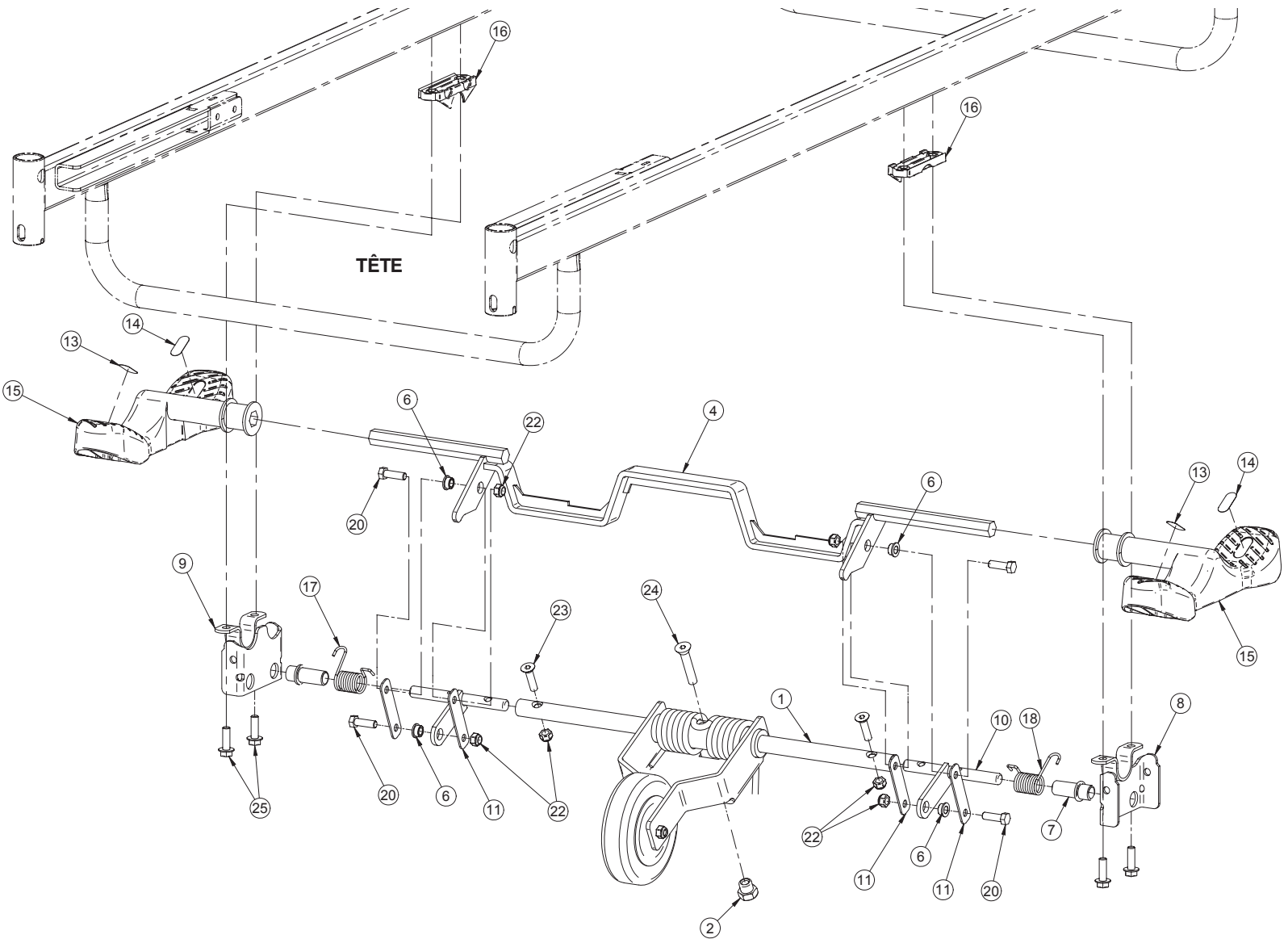

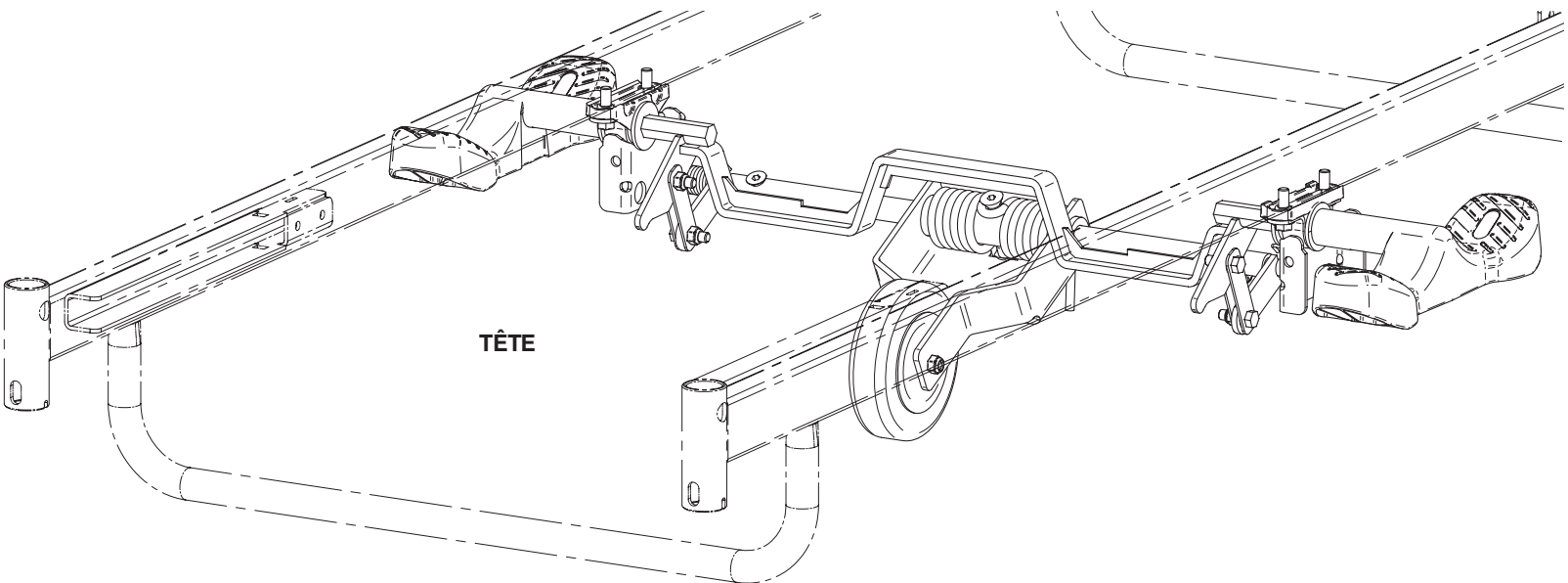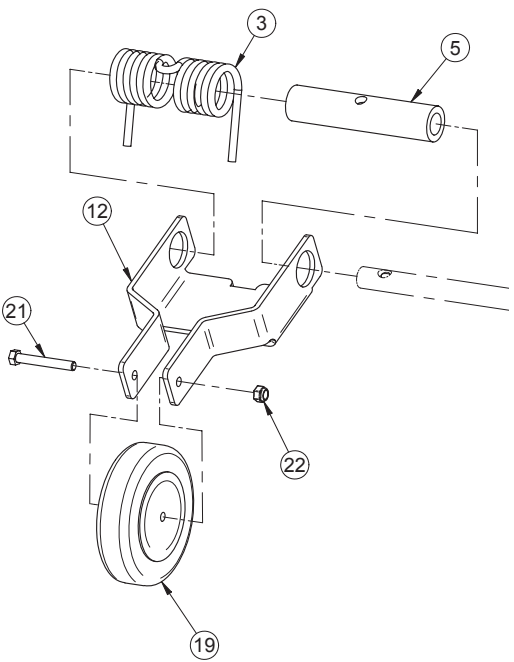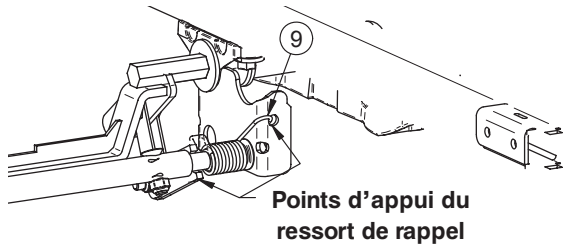

5^e roue

5^e roue (Référence seulement : OL230219G, Rév. 03)

Item	Numéro de pièce	Description	Quantité
1	17-0082G	Arbre de levier	1
2	17-0104Z	Appui de 5 ^e roue	1
3	17-0124G	Ressort de 5 ^e roue	1
4	23-0714G	S.A. Levier d'actionnement	1
5	25-0068	Coussinet 5 ^e roue	1
6	QPA25-0340	Entretoise 5/16 x 3/16	4
7	25-0581	Douille de nylon diamètre 1/2" int.	2
8	28-0132Z	S.A. Support droit de 5 ^e roue	1
9	28-0133Z	S.A. Support gauche de 5 ^e roue	1
10	28-0149Z	S.A. Levier de torsion	2
11	28-0150Z	Levier de liaison	4
12	28-0151G	Bras de débattement	1
13	QE71-0496	Autocollant 5 ^e roue (vert)	2
14	QE71-0511	Autocollant frein (rouge)	2
15	QP23-0627	Pédale papillon	2
16	QPA25-0312	Espaceur moulé	2
17	QRD25-0582	Ressort de rappel gauche	1
18	QRD25-0585	Ressort de rappel droit	1
19	RL5	5 ^e roue	1
20	VB15A1O32	Boulon 5/16-18 x 1" LG grade 5	4
21	VB15A1O50	Boulon 5/16-18 x 2 1/4" LG grade 5	1
22	VE30A1O	Écrou à blocage nylon 5/16-18	7
23	VV11A1O36	Vis tête plate 6 pans creux 5/16-18 UNC x 1 1/4"	2
24	VV11A1P48	Vis tête plate 6 pans creux 3/8-16 UNC x 2"	1
25	VVB4A1O32	Boulon 5/16"-18 x 1" filet roulant	4


5^e roue

5^e roue (Référence seulement : OL230219G-T, Rév. 00) (option antivol)

Item	Numéro de pièce	Description	Quantité
1	17-0082G	Arbre de levier	1
2	17-0104Z	Appui de 5 ^e roue	1
3	17-0124G	Ressort de 5 ^e roue	1
4	23-0714G	S.A. Levier d'actionnement	1
5	25-0068	Coussinet 5 ^e roue	1
6	QPA25-0340	Entretoise 5/16 x 3/16	4
7	25-0581	Douille de nylon diamètre 1/2" int.	2
8	28-0132Z	S.A. Support droit de 5 ^e roue	1
9	28-0133Z	S.A. Support gauche de 5 ^e roue	1
10	28-0149Z	S.A. Levier de torsion	2
11	28-0150Z	Levier de liaison	4
12	28-0151G	Bras de débattement	1
13	QE71-0496	Autocollant 5 ^e roue (vert)	2
14	QE71-0511	Autocollant frein (rouge)	2
15	QP23-0627	Pédale papillon	2
16	QPA25-0312	Espaceur moulée	2
17	QRD25-0582	Ressort de rappel gauche	1
18	QRD25-0585	Ressort de rappel droit	1
19	RL5	5 ^e roue	1
20	VVB3A1O32-S	Vis mécanique tête pan torx 5/16-18 x 1" LG grade 5	4
21	VVB3A1O50-S	Vis mécanique tête pan torx 5/16-18 x 2 1/4" LG grade 5	1
22	VE52A10	Écrou antivol 5/16-18 UNC p.z.	7
23	VVB1A1O36-S	Vis tête plate torx 5/16-18 UNC x 1 1/4" p.z.	2
24	VVB1A1P48-S	Vis tête plate torx 3/8-16 UNC x 2" p.z.	1
25	VVB4A1O32	Boulon 5/16"-18 x 1" filet roulant	4




Mécanisme d'élévation

Référence seulement : L23-028
Rév. 02

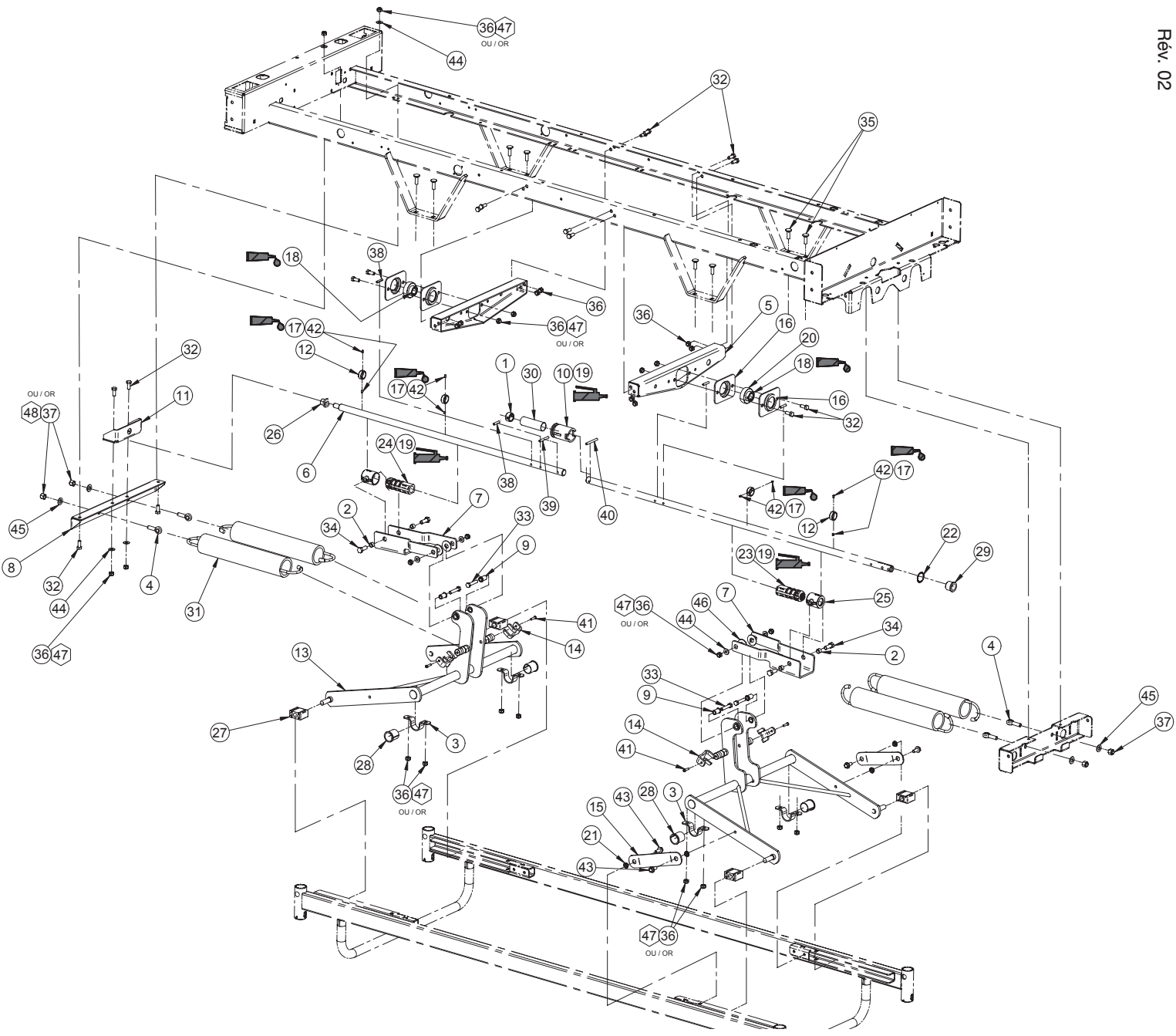

[Retour à la table des matières](#)

Mécanisme d'élévation

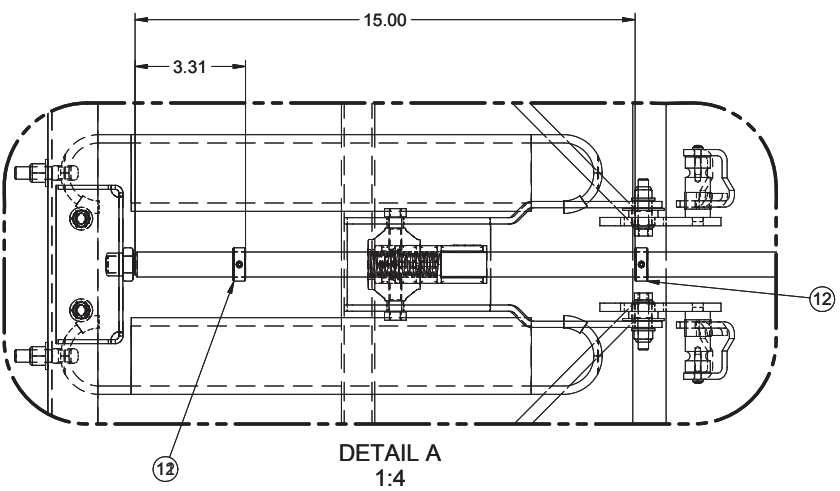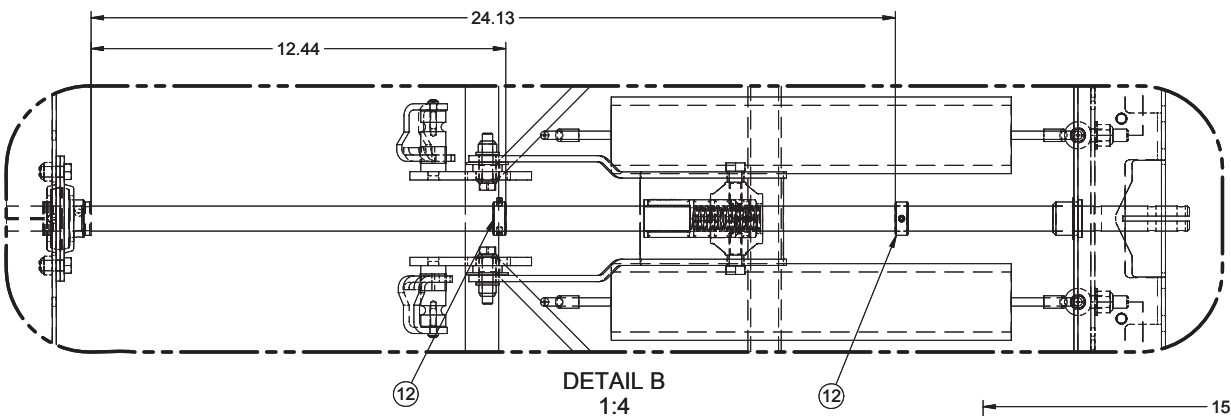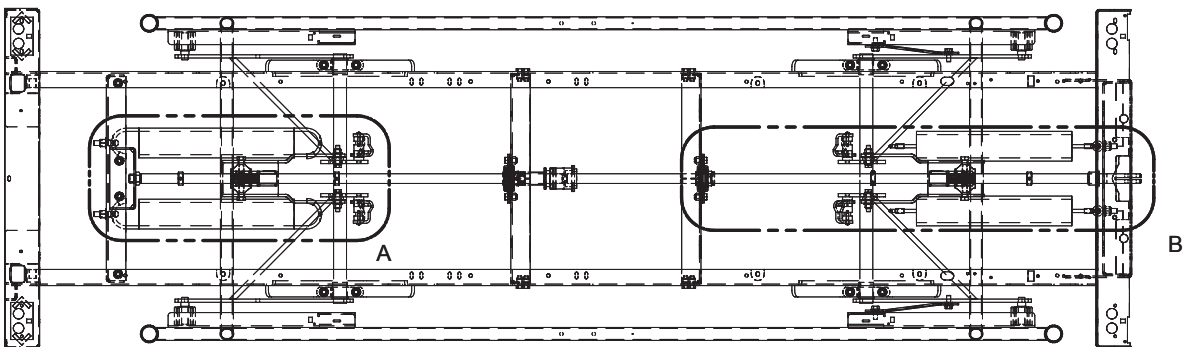

Mécanisme d'élévation

Mécanisme d'élévation (Référence seulement : L23-028, Rév. 02)

Item	Numéro de pièce	Description	Quantité
1	1311P017-Z	Bloqueur de vis	1
2	14403Z	Espaceur	4
3	14662Z	Support de balancier	4
4	VB40A1P34-S	Attache ressort	4
5	23-0355G	Traverse de centre	2
6	23-0375Z	Vis centrale de tête	1
7	23-0379G	Harnais de vis d'élévation	2
8	23-0385G	Traverse de ressorts	1
9	23-0456	Espaceur	4
10	23-0538	Boîte de couplage	1
11	23-0543G	Support de vis	1
12	23-0575Z	Bloqueur de vis	4
13	23-0841G	S.A. Balancier	2
14	23-0850Z	Plaque de retenue	4
15	25-0281G	Stabilisateur	2
16	493G	Plaque de roulement diamètre 3/4"	4
17	M0008	Ciment à filets (bleu)	-
18	M0015	Ciment à filets force moyenne (vert)	-
19	M0019	Graisse grade OG 2	0.0300 kg
20	QBAS204012	Roulement 3/4"	2
21	QDF17-0020	Entretoise à épaulement	4
22	QDF7852	Bague de retenue à dents dia. 10	1
23	QP13-0675-11	Écrou «Stub Acme» droit	1
24	QP13-0676-01	Écrou «Stub Acme» gauche	1
25	QPA13-0674	Support de l'écrou	2
26	QPN-13-0159	Coussinet nylon diamètre 1/2" int.	1
27	QPN-1310P009	Glisseur	4
28	QPN-18121	Palier du cadre moulé	4
29	QPN18315	Coussinet nylon diamètre 3/4"	1
30	QRCL498	Ressort compression diamètre 1" x 3" long x 0.045"	1
31	QRE23-0871	Ressort d'extension	4
32	VB15A1O24	Boulon hex. 5/16-18 x 3/4" lg gr. 5	16
33	VB15A1O40	Boulon 5/16-18 x 1 1/2" LG	4
34	VB15A1P32-S	Boulon hex. 3/8-16 x 1" Scotch Grip	4
35	VB35A1O32	Boulon carrosserie 5/16-18 x 1" grade 5 p.z.	8
36	VE30A1O	Écrou à blocage nylon 5/16"-18	28
37	VE30A1P	Écrou à blocage nylon 3/8-16	4
38	VG10B0732	Goupille ressort dia. 0.219" x 1"	4
39	VG10B0742	Goupille ressort dia. 0.219" x 1.625"	1
40	VG10B0748	Goupille ressort dia. 0.219" x 2"	1
41	VV33A0G24	Vis mécanique tête pan Phillips 10-32 x 3/4" lg	4
42	VV60B1E08	Vis pression hex. creux 8-32x1/4"	8
43	VVB4A1024	Boulon 5/16-18 x 3/4 filet roulant	4
44	VW10A10	Rondelle plate 5/16" S.A.E.	8
45	VW10A12	Rondelle 3/8" int. x 13/16" ext. x 1/16" ép.	4
46	VW10C173602	Rondelle nylon	4

[Retour à la table des matières](#)


Mécanisme d'élévation

Mécanisme d'élévation (Référence seulement : L23-028-T, Rév. 02) (option antivol)

Item	Numéro de pièce	Description	Quantité
1	1311P017Z	Bloqueur de vis	1
2	14403Z	Espaceur	4
3	14662Z	Support de balancier	4
4	VB40A1P34-S	Attache ressort	4
5	23-0355G	Traverse de centre	2
6	23-0375Z	Vis centrale de tête	1
7	23-0379G	Harnais de vis d'élévation	2
8	23-0385G	Traverse de ressorts	1
9	23-0456	Espaceur	4
10	23-0538	Boîte de couplage	1
11	23-0543G	Support de vis	1
12	23-0575Z	Bloqueur de vis	4
13	23-0841G	S.A. Balancier	2
14	23-0850Z	Plaque de retenue	4
15	25-0281G	Stabilisateur	2
16	493G	Plaque de roulement diamètre 3/4"	4
17	M0008	Ciment à filets (bleu)	-
18	M0015	Ciment à filets force moyenne (vert)	-
19	M0019	Graisse grade OG 2	0.0300 kg
20	QBAS204012	Roulement 3/4"	2
21	QDF17-0020	Entretoise à épaulement	4
22	QDF7852	Bague de retenue à dents dia. 10	1
23	QP13-0675-11	Écrou «Stub Acme» droit	1
24	QP13-0676-01	Écrou «Stub Acme» gauche	1
25	QPA13-0674	Support de l'écrou	2
26	QPN-13-0159	Coussinet nylon diamètre 1/2" int.	1
27	QPN-1310P009	Glisseur	4
28	QPN-18121	Palier du cadre moulé	4
29	QPN18315	Coussinet nylon diamètre 3/4"	1
30	QRCL498	Ressort compression diamètre 1" x 3" long x 0.045"	1
31	QRE23-0871	Ressort d'extension	4
32	VVB3A1O24-S	Vis méc. t. pan torx 5/16-18 x 3/4" lg grade 5	16
33	VB15A1O40	Boulon 5/16-18 x 1 1/2" LG	4
34	VVB3A1P32-S	Vis méc. t. pan torx 3/8-16 x 1" Scotch Grip	4
35	VB35A1O32	Boulon carrosserie 5/16-18 x 1" grade 5 p.z.	8
36	VE30A1O	Écrou à blocage nylon 5/16"-18	8
37	VE30A1P	Écrou à blocage nylon 3/8-16	2
38	VG10B0732	Goupille ressort dia. 0.219" x 1"	4
39	VG10B0742	Goupille ressort dia. 0.219" x 1.625"	1
40	VG10B0748	Goupille ressort dia. 0.219" x 2"	1
41	VVB3A0G24-S	Vis méc. t. pan torx 10-32 x 3/4" lg	4
42	VV60B1E08	Vis pression hex. creux 8-32x1/4"	8
43	VVB4A1024	Boulon 5/16-18 x 3/4 filet roulant	4
44	VW10A10	Rondelle plate 5/16" S.A.E.	8
45	VW10A12	Rondelle 3/8" x13/16" x1/16" ép.	4
46	VW10C173602	Rondelle nylon	4
47	VE52A1O	Écrou antivol 5/16-18	20
48	VE52A1P	Écrou antivol 3/8-16	2

Châssis court

Référence seulement : L23-027
Rév. 01

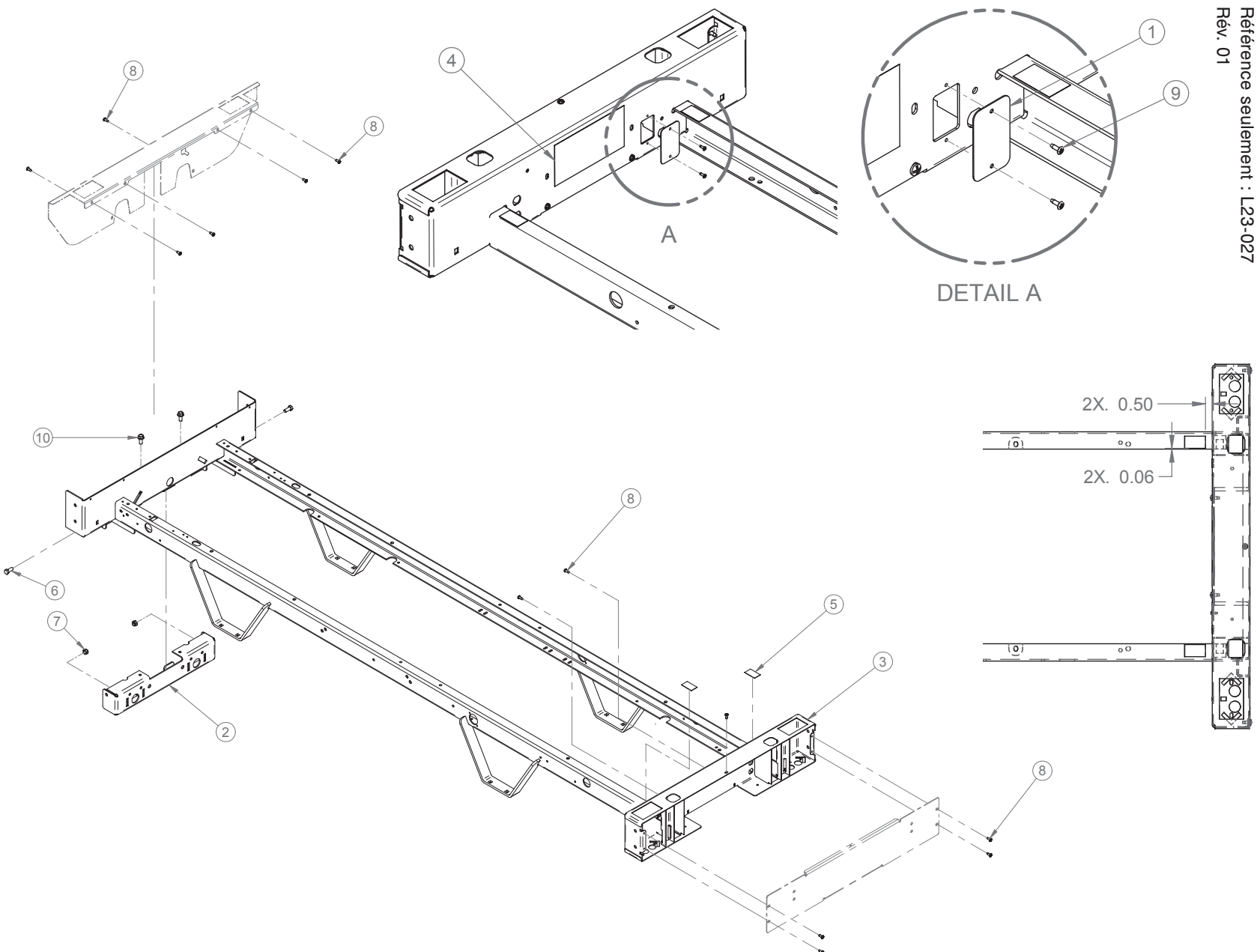

Châssis court

Châssis court (Référence seulement : L23-027G, Rév. 01)

Item	Numéro de pièce	Description	Quantité
1	14-1448G	Cache-trou	1
2	23-0352G	Traverse de pied	1
3	23-0791G	Châssis court	1
4	QE71-1250	Autocollant manufacturier	1
5	QE71-1069	Autocollant protection de châssis	2
6	VB15A1O24	Boulon 5/16-18 x 3/4" LG grade 5	2
7	VE30A1O	Écrou blocage nylon 5/16-18	2
8	VV83A9G16	Vis taraudeuse tête pan Phillips type B #10 x 1/2" p.z.	13
9	VV87A9A12	Vis taraudeuse type B tête «Truss» Phillips #4 x 3/8" p.z.	2
10	VVB4A1024	Boulon 5/16"-18 x 3/4" filet roulant	2


Châssis court (Référence seulement : L23-027G-T, Rév. 01) (option antivol)

Item	Numéro de pièce	Description	Quantité
1	14-1448G	Cache-trou	1
2	23-0352G	Traverse de pied	1
3	23-0791G	Châssis court	1
4	QE71-1250	Autocollant manufacturier	1
5	QE71-1069	Autocollant protection de châssis	2
6	VVB3A1O24-S	Boulon 5/16-18 x 3/4" LG grade 5	2
7	VE30A1O	Écrou blocage nylon 5/16-18	2
8	VVB3A0G16	Vis taraudeuse tête pan torx type B #10 x 1/2" p.z.	13
9	VV87A9A12	Vis taraudeuse type B tête «Truss» Phillips #4 x 3/8" p.z.	2
10	VVB4A1024	Boulon 5/16"-18 x 3/4" filet roulant	2

Pare-chocs - Une roulette rigide

Référence seulement : OL230265

Rév. 01

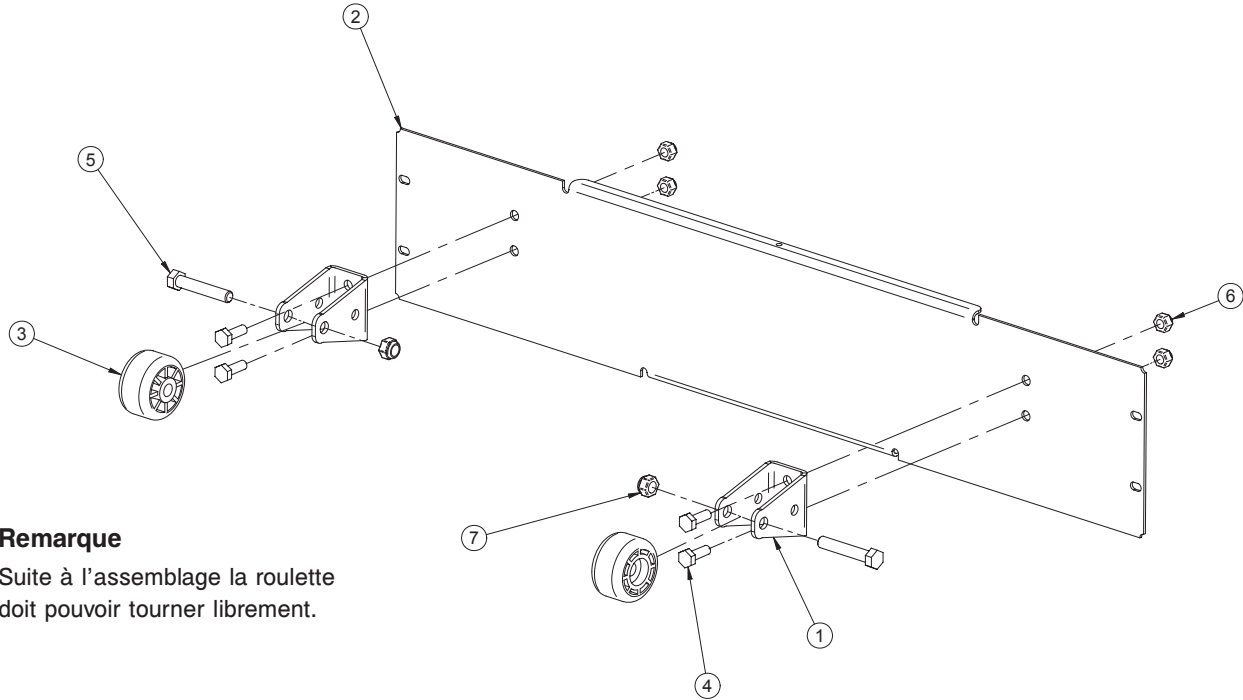

Remarque

Suite à l'assemblage la roulette doit pouvoir tourner librement.

Pare-chocs - une roulette rigide (Référence seulement : OL230265G, Rév. 01)

Item	Numéro de pièce	Description	Quantité
1	23-0798G	Support de pare-choc simple	2
2	23-0824G	Couvercle de tête pare-chocs à roulettes	1
3	QPN14-0705	Roulette pour balancier de tête	2
4	VB15A1N24	Boulon 1/4-20 x 3/4" grade 5 p.z.	4
5	VB15A1O44	Boulon 5/16-18 x 1 3/4" LG grade 5	2
6	VE30A1N	Écrou à blocage nylon 1/4-20	4
7	VE30A1O	Écrou à blocage nylon 5/16-18	2

Pare-chocs - une roulette rigide (Référence seulement : OL230265G-T, Rév. 01) (option antiviol)


Item	Numéro de pièce	Description	Quantité
1	23-0798G	Support de pare-choc simple	2
2	23-0824G	Couvercle de tête pare-chocs à roulettes	1
3	QPN14-0705	Roulette pour balancier de tête	2
4	VB15A1N24	Boulon 1/4-20 x 3/4" grade 5 p.z.	4
5	VVB3A1O44-S	Vls mécanique tête pan torx 5/16-18 x 1 3/4" LG grade 5	2
6	VE30A1N	Écrou à blocage nylon 1/4-20	4
7	VE30A1O	Écrou à blocage nylon 5/16-18	2

[Retour à la table des matières](#)

Pare-chocs - Deux roulettes souples

Référence seulement : OL230264

Rév. 01

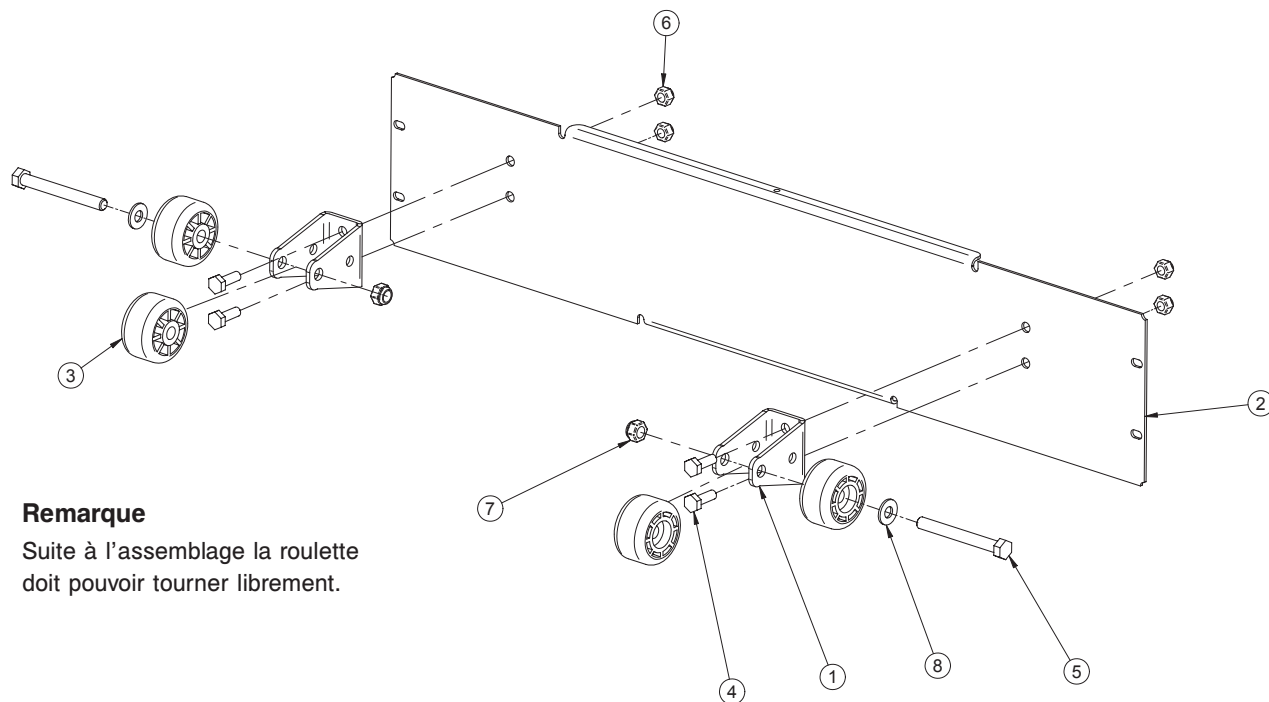

Remarque

Suite à l'assemblage la roulette doit pouvoir tourner librement.

Pare-chocs - deux roulettes souples (Référence seulement : OL230264G, Rév. 01)

Item	Numéro de pièce	Description	Quantité
1	23-0798G	Support pare-choc simple	2
2	23-0824G	Couvercle de tête - pare-chocs à roulettes	1
3	QPC-14-0321	Roulette diamètre 1 3/4"	4
4	VB15A1N24	Boulon 1/4"-20 x 3/4" grade 5 p.z.	4
5	VB15A1O54	Boulon 5/16-18 x 2 3/4" LG, «Full Thread»	2
6	VE30A1N	Écrou à blocage nylon 1/4-20	4
7	VE30A1O	Écrou blocage nylon 5/16"-18	2
8	VW10A10	Rondelle plate diamètre 5/16" SAE	2


Pare-chocs - deux roulettes souples (Référence seulement : OL230264G-T, Rév. 01) (option antivol)

Item	Numéro de pièce	Description	Quantité
1	23-0798G	Support pare-choc simple	2
2	23-0824G	Couvercle de tête - pare-chocs à roulettes	1
3	QPC-14-0321	Roulette diamètre 1 3/4"	4
4	VB15A1N24	Boulon 1/4"-20 x 3/4" grade 5 p.z.	4
5	VVB3A1O54-S	Vis mécanique tête pan torx 5/16-18 x 2 3/4" LG	2
6	VE30A1N	Écrou à blocage nylon 1/4-20	4
7	VE30A1O	Écrou blocage nylon 5/16"-18	2
8	VW10A10	Rondelle plate diamètre 5/16" SAE	2

Pare-choc de lit court

Référence seulement : OL230266

Rév. 00

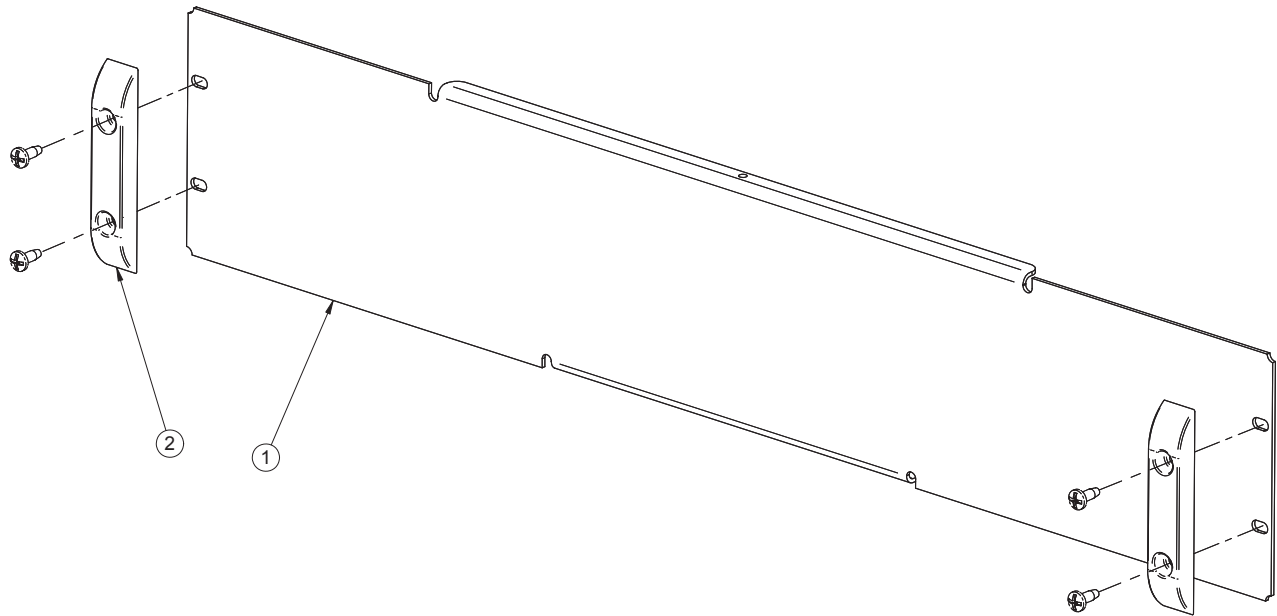


Pare-choc de lit court (Référence seulement : OL230266G, Rév. 00)

Item	Numéro de pièce	Description	Quantité
1	23-0825G	Couvercle de tête - pare-chocs courts	1
2	QP23-0776	Glisseur	2

[Retour à la table des matières](#)


Options Trendelenburg et élévation de pied

Référence seulement : OL230296
Rév. 01

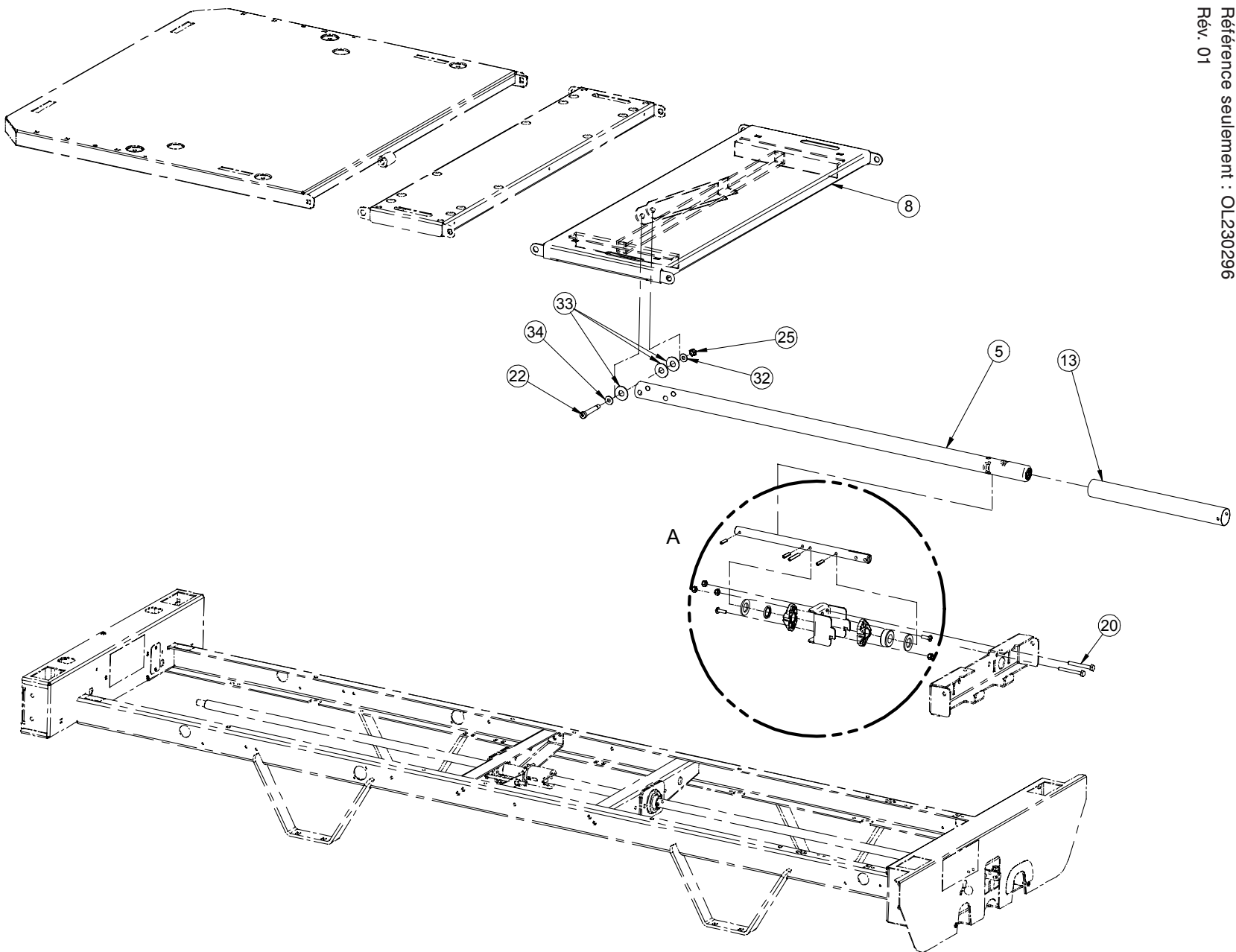

Retour à la table des matières



Options Trendelenburg et élévation de pied

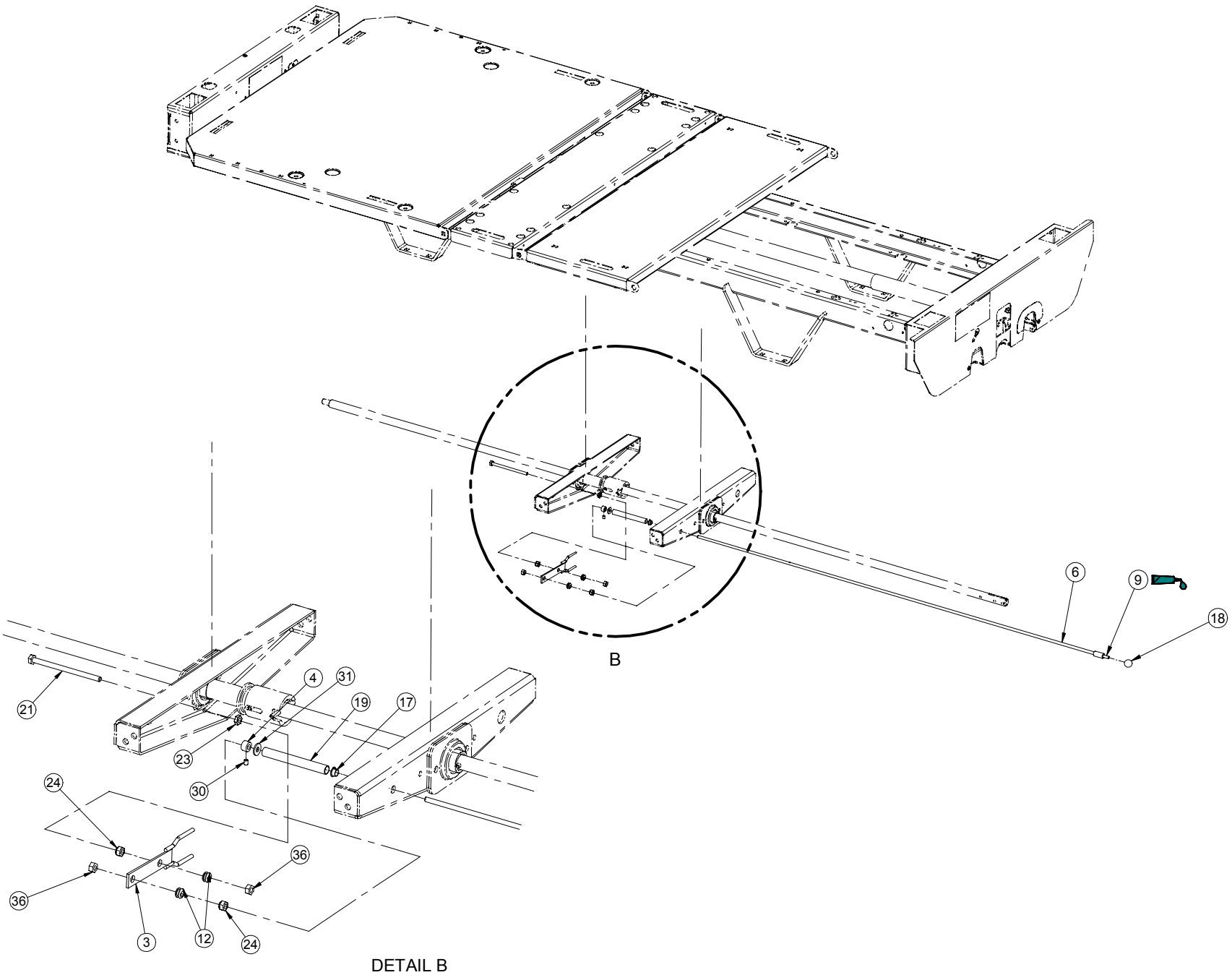

DETAIL B

Retour à la table des matières

Options Trendelenburg et élévation de pied

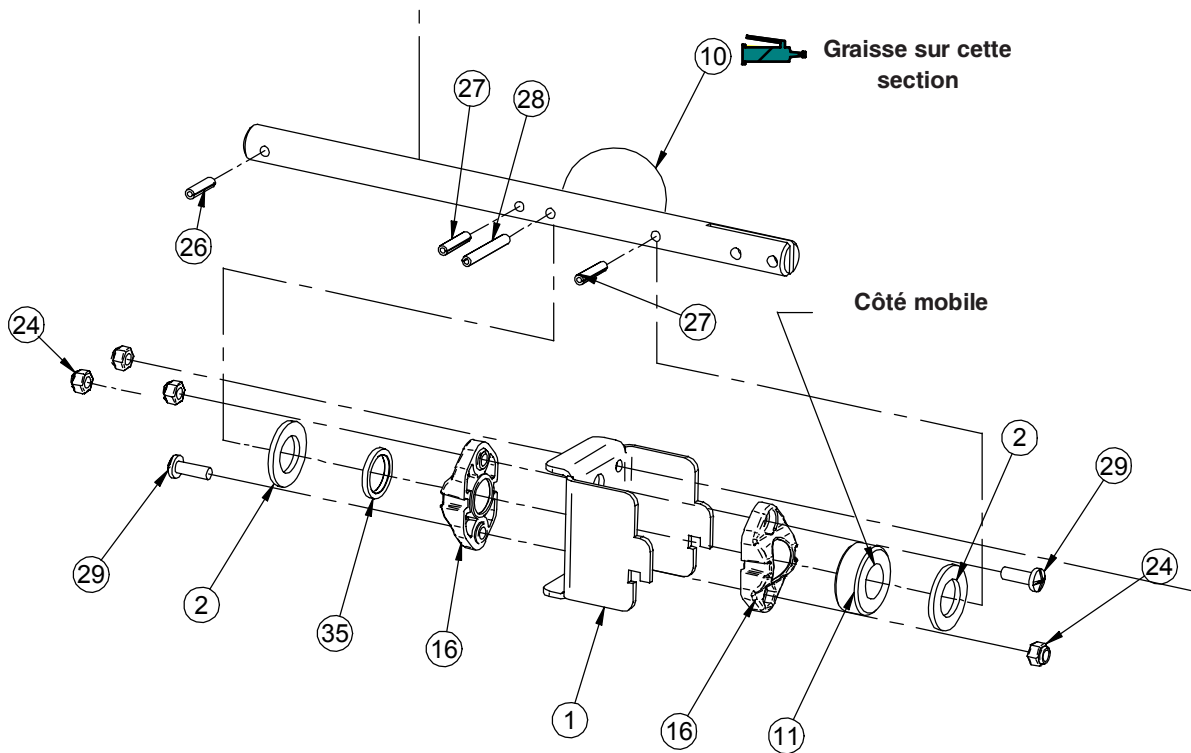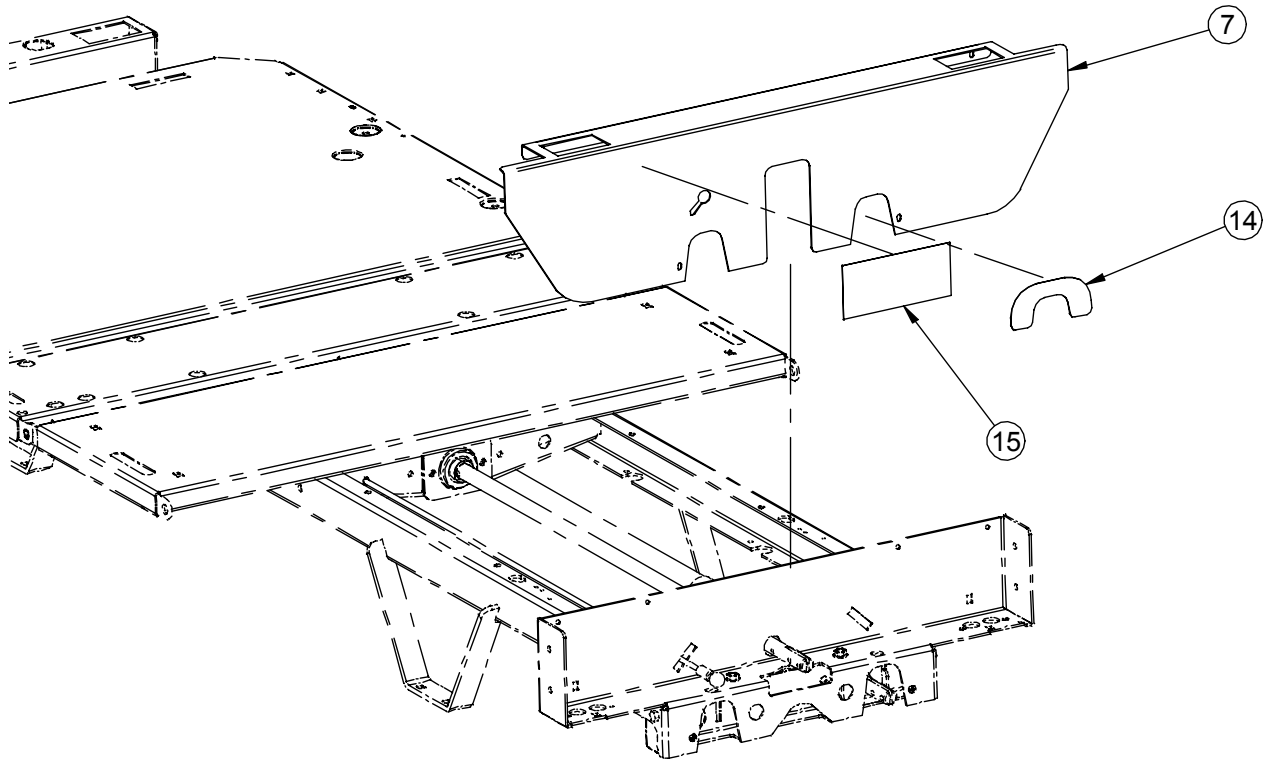

DETAIL A

Options *Trendelenburg* et élévation de pied

Options *Trendelenburg* et élévation de pied (Référence seulement : OL230296G, Rév. 01)

Item	Numéro de pièce	Description	Quantité
1	13-0853G	Support de vis	1
2	13-0956Z	Rondelle pour boulon 3/4	2
3	18108G	Levier d'actionnement <i>Trendelenburg</i>	1
4	19-0478Z	Butée ajustable	1
5	23-0357	S.A. Tube actuateur de cuisse	1
6	23-0539Z	S.A. Tige d'embrayage (<i>Trendelenburg</i>)	1
7	23-0653G	Couvercle de pied pleine longueur FL23M	1
8	25-0634G	S.A. Sommier de cuisse	1
9	M0008	Ciment à filets (bleu)	-
10	M0019	Graisse grade OG 2	-
11	QB4459-00	Butée à bille diamètre 3/4"	1
12	QDF9506	Passe-fil en caoutchouc	2
13	QDFT18-0254	Tube de protection - vis	1
14	QE71-1242	Autocollant mouvement sommier de pied	1
15	QE71-1244	Autocollant fonction <i>Trendelenburg</i>	1
16	QP18-0248	Pivot pour vis de manivelle	2
17	QPNI2402	Coussinet en nylon avec épaulement diamètre 1/4	1
18	QPPB0301	Poignée ronde	1
19	QRC18135	Ressort de tige d'embrayage	1
20	VB15A1N50	Boulon 1/4"-20 x 2 1/4" p.z. grade 5	2
21	VB15A1N64FT	Boulon 1/4"-20 x 4" grade 5 p.z.	1
22	VD60B1O1248	Vis à épaulement 3/8" x 2" x 5/16"-18	1
23	VE20A1N	Contre-écrou 1/4-20	1
24	VE30A1N	Écrou à blocage nylon 1/4-20	8
25	VE30A1O	Écrou à blocage nylon 5/16"-18	1
26	VG10B0728	Goupille à ressort diamètre 0.219" x 0.875"	1
27	VG10B0732	Goupille à ressort diamètre 0.219" x 1.00"	2
28	VG10B0742	Goupille à ressort diamètre 0.219" x 1.625"	1
29	VV33A1N24	Vis mécanique tête pan Phillips 1/4-20 x 3/4" LG	2
30	VV60A0G08-S	Vis pression hex. #10-32 x 1/4" lg Scotch Grip	1
31	VW10A08	Rondelle plate 1/4 x 1/16	1
32	VW10A10	Rondelle plate diamètre 5/16" S.A.E.	1
33	VW10C173602	Rondelle de nylon	3
34	VW10C241002	Rondelle nylon 5/16" int. x 3/4" ext. x 1/16" ép.	1
35	VW10C263304	Rondelle nylon 0.813 x 1.063 x 0.125	1
36	VE50A1N	Écrou indesserrable à deux sens 1/4-20	2

[Retour à la table des matières](#)


Options *Trendelenburg* et élévation de pied


Options *Trendelenburg* et élévation de pied (Référence seulement : OL230296G-T, Rév. 01) (option antivol)

Item	Numéro de pièce	Description	Quantité
1	13-0853G	Support de vis	1
2	13-0956Z	Rondelle pour boulon 3/4	2
3	18108G	Levier d'actionnement <i>Trendelenburg</i>	1
4	19-0478Z	Butée ajustable	1
5	23-0357	S.A. Tube actuateur de cuisse	1
6	23-0539Z	S.A. Tige d'embrayage (<i>Trendelenburg</i>)	1
7	23-0653G	Couvercle de pied pleine longueur FL23M	1
8	25-0634G	S.A. Sommier de cuisse	1
9	M0008	Ciment à filets (bleu)	-
10	M0019	Graisse grade OG 2	-
11	QB4459-00	Butée à bille diamètre 3/4"	1
12	QDF9506	Passe-fil en caoutchouc	2
13	QDFT18-0254	Tube de protection - vis	1
14	QE71-1242	Autocollant mouvement sommier de pied	1
15	QE71-1244	Autocollant fonction <i>Trendelenburg</i>	1
16	QP18-0248	Pivot pour vis de manivelle	2
17	QPNI2402	Coussinet en nylon avec épaulement diamètre 1/4	1
18	QPPB0301	Poignée ronde	1
19	QRC18135	Ressort de tige d'embrayage	1
20	VB15A1N50	Boulon 1/4"-20 x 2 1/4" p.z. grade 5	2
21	VVB3A1N64-S	Vis méc. t. pan torx 1/4"-20 x 4" gr. 5 p.z.	1
22	VD60B1O1248	Vis à épaulement 3/8" x 2" x 5/16"-18	1
23	VE20A1N	Contre-écrou 1/4-20	1
24	VE30A1N	Écrou à blocage nylon 1/4-20	6
25	VE52A1O	Écrou antivol 5/16"-18	1
26	VG10B0728	Goupille à ressort diamètre 0.219" x 0.875"	1
27	VG10B0732	Goupille à ressort diamètre 0.219" x 1.00"	2
28	VG10B0742	Goupille à ressort diamètre 0.219" x 1.625"	1
29	VVB3A1N24-S	Vis méc. t. pan torx 1/4-20 x 3/4" LG	2
30	VV60A0G08-S	Vis pression hex. #10-32 x 1/4" lg Scotch Grip	1
31	VW10A08	Rondelle plate 1/4 x 1/16	1
32	VW10A10	Rondelle plate diamètre 5/16" S.A.E.	1
33	VW10C173602	Rondelle de nylon	3
34	VW10C241002	Rondelle nylon 5/16" int. x 3/4" ext. x 1/16" ép.	1
35	VW10C263304	Rondelle nylon 0.813 x 1.063 x 0.125	1
36	VE50A1N	Écrou indesserrable à deux sens 1/4-20	2

Options Trendelenburg

Référence seulement : OL230261
Rév. 01

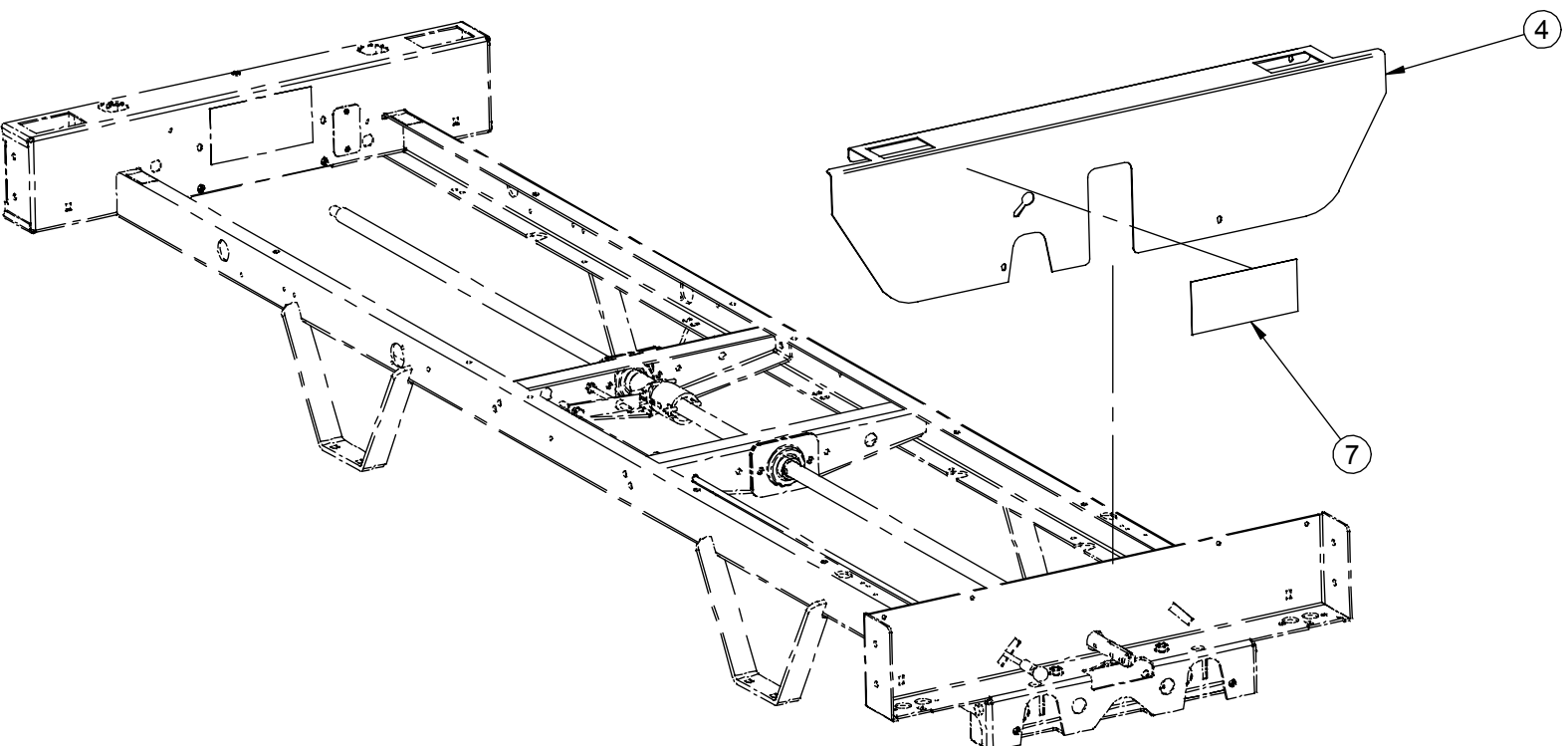

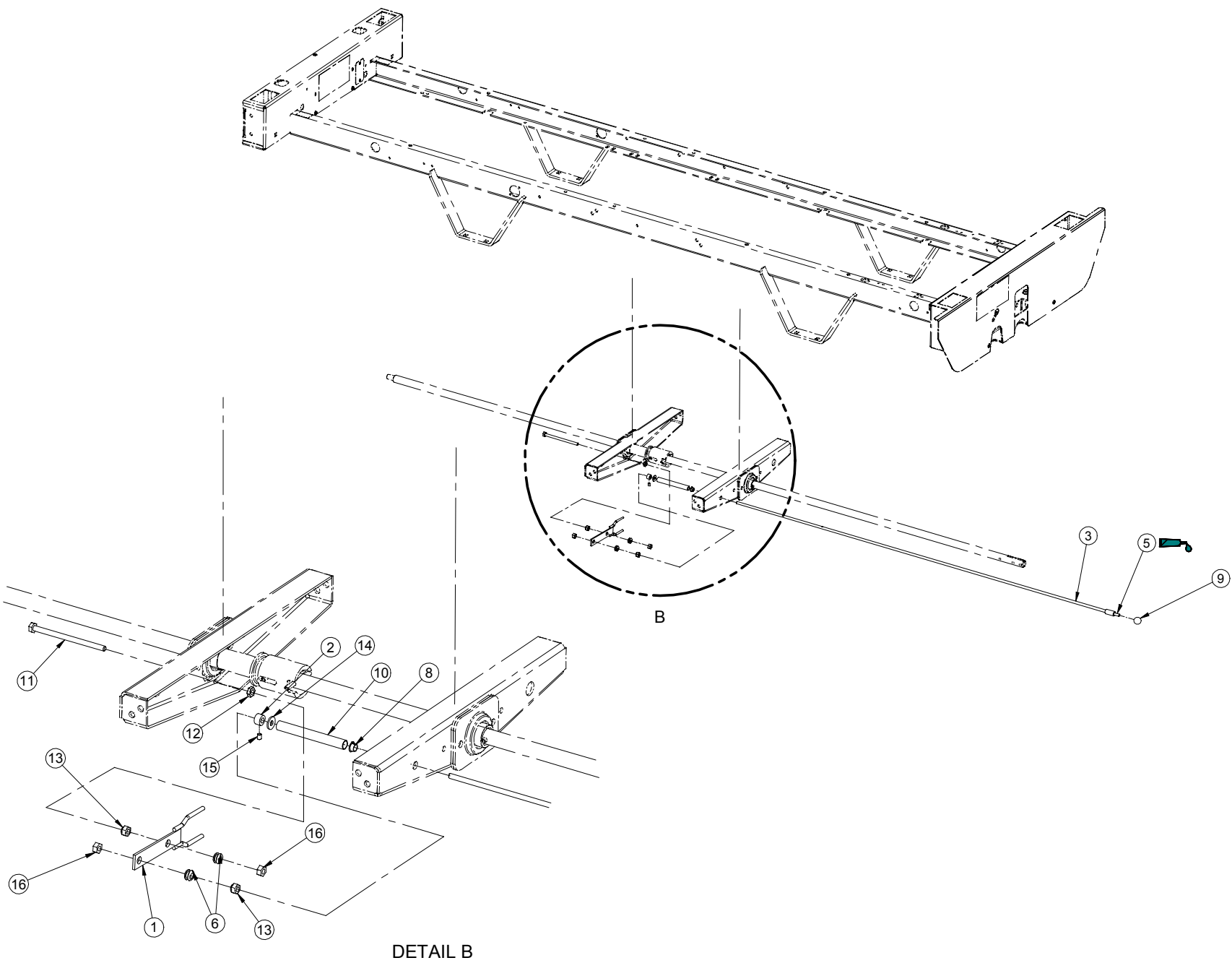

Options Trendelenburg

Options Trendelenburg (Référence seulement : OL230261G, Rév. 01)

Item	Numéro de pièce	Description	Quantité
1	18108G	Levier d'actionnement <i>Trendelenburg</i>	1
2	19-0478Z	Butée ajustable	1
3	23-0539Z	S.A. Tige d'embrayage (<i>Trendelenburg</i>)	1
4	23-0821G	Couvercle de pied avec <i>Trendelenburg</i> sans cuisse	1
5	M0008	Ciment à filets (bleu)	-
6	QDF9506	Passe-fil caoutchouc	2
7	QE71-1244	Autocollant fonction <i>Trendelenburg</i>	1
8	QPNI2402	Coussinet en nylon avec épaulement diamètre 1/4"	1
9	QPPB0301	Poignée ronde	1
10	QRC18135	Ressort de tige d'embrayage	1
11	VB15A1N64FT	Boulon 1/4"-20 x 4" grade 5 p.z.	1
12	VE20A1N	Contre-écrou 1/4-20	1
13	VE30A1N	Écrou à blocage nylon 1/4-20	4
14	VV60A0G08-S	Vis pression hex. #10-32 x 1/4" lg Scotch Grip	1
15	VW10A08	Rondelle plate 1/4 x 1/16	1
16	VE50A1N	Écrou indesserrable à deux sens 1/4-20	2


Options Trendelenburg (Référence seulement : OL230261G-T, Rév. 01) (option antivol)

Item	Numéro de pièce	Description	Quantité
1	18108G	Levier d'actionnement <i>Trendelenburg</i>	1
2	19-0478Z	Butée ajustable	1
3	23-0539Z	S.A. Tige d'embrayage (<i>Trendelenburg</i>)	1
4	23-0821G	Couvercle de pied avec <i>Trendelenburg</i> sans cuisse	1
5	M0008	Ciment à filets (bleu)	-
6	QDF9506	Passe-fil caoutchouc	2
7	QE71-1244	Autocollant fonction <i>Trendelenburg</i>	1
8	QPNI2402	Coussinet en nylon avec épaulement diamètre 1/4"	1
9	QPPB0301	Poignée ronde	1
10	QRC18135	Ressort de tige d'embrayage	1
11	VVB3A1N64-S	Vis mécanique tête pan torx 1/4"-20 x 4" grade 5 p.z.	1
12	VE20A1N	Contre-écrou 1/4-20	1
13	VE30A1N	Écrou à blocage nylon 1/4-20	2
14	VV60A0G08-S	Vis pression hex. #10-32 x 1/4" lg Scotch Grip	1
15	VW10A08	Rondelle plate 1/4 x 1/16	1
16	VE50A1N	Écrou indesserrable à deux sens 1/4-20	2



Notes

Option élévation de pied

Référence seulement : OL230262
Rév. 00

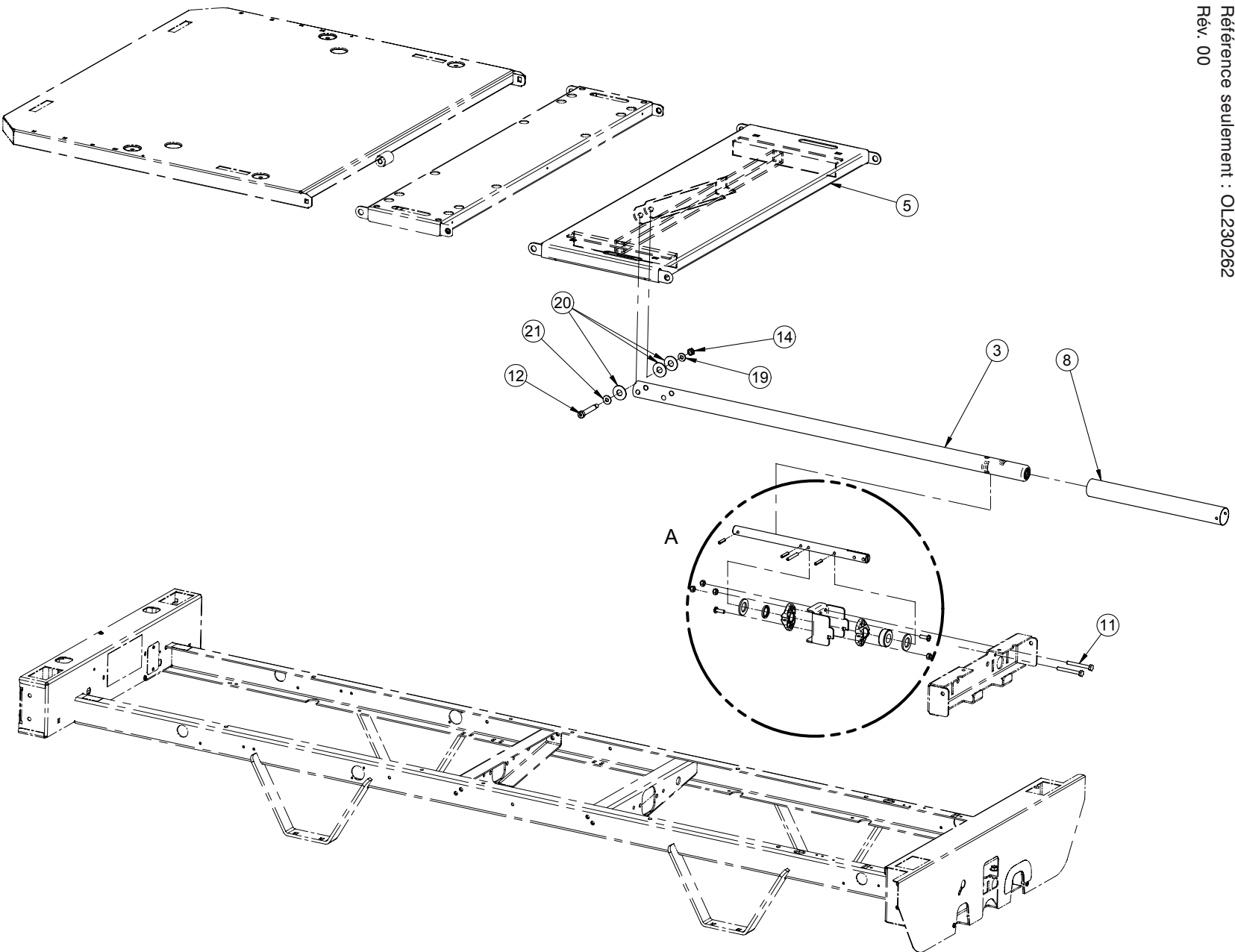

Option élévation de pied

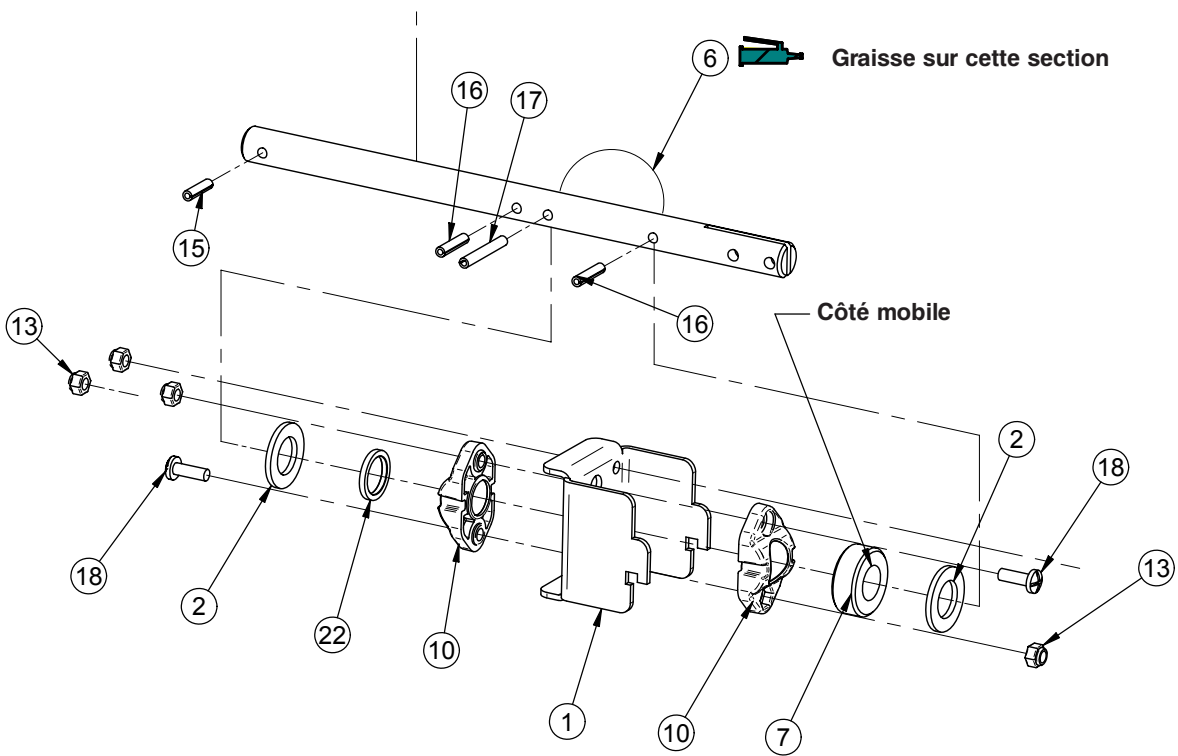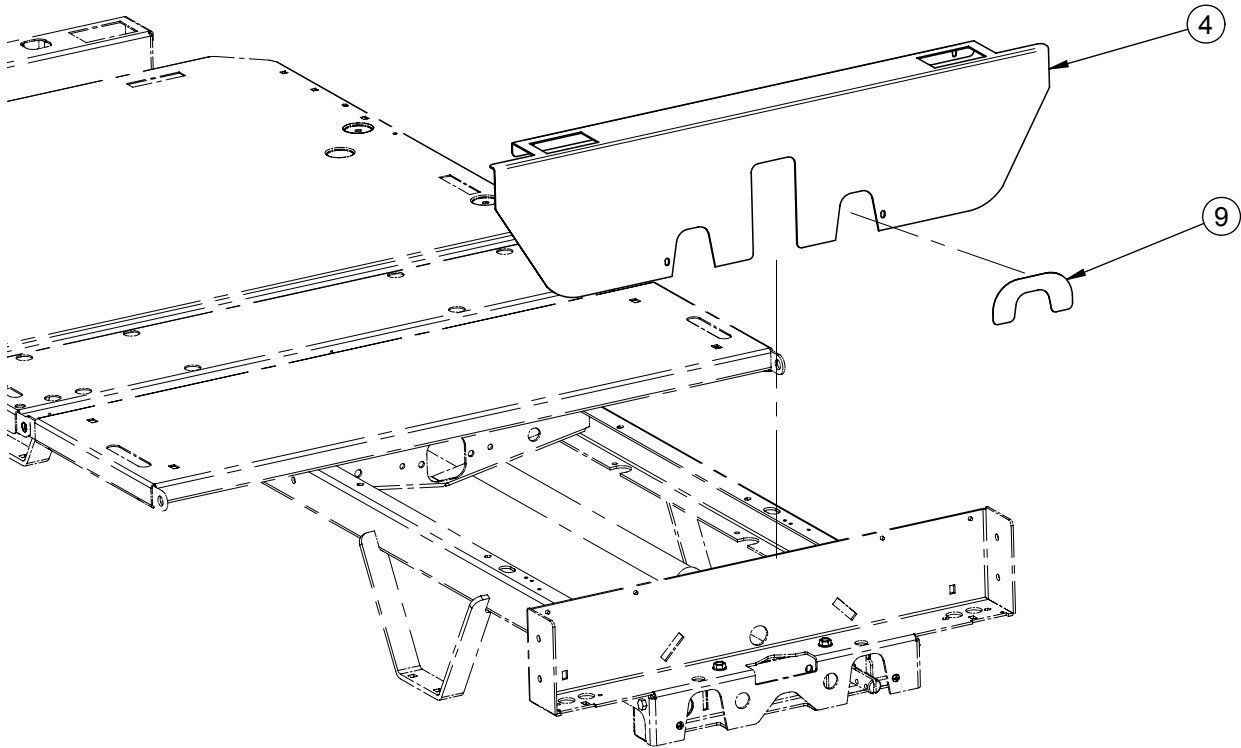

Option élévation de pied

Option élévation de pied (Référence seulement : OL230262G)

Item	Numéro de pièce	Description	Quantité
1	13-0853G	Support de vis	1
2	13-0956Z	Rondelle pour boulon 3/4"	2
3	23-0357	S.A. Tube actuateur de cuisse	1
4	23-0822G	Couvercle de pied sans <i>Trendelenburg</i> avec cuisse	1
5	25-0634G	S.A. Sommier de cuisse	1
6	M0019	Graisse grade OG 2	-
7	QB4459-00	Butée à bille diamètre 3/4"	1
8	QDFT18-0254	Tube de protection - vis	1
9	QE71-1242	Autocollant mouvement sommier de pied	1
10	QP18-0248	Pivot pour vis de manivelle	2
11	VB15A1N50	Boulon 1/4"-20 x 2 1/4" p.z. grade 5	2
12	VD60B1O1248	Vis à épaulement 3/8" x 2 x 5/16-18	1
13	VE30A1N	Écrou à blocage nylon 1/4-20	4
14	VE30A1O	Écrou à blocage nylon 5/16-18	1
15	VG10B0728	Goupille ressort dia. 0.219" x 0.875"	1
16	VG10B0732	Goupille ressort dia. 0.219" x 1.00"	2
17	VG10B0742	Goupille ressort dia. 0.219" x 1.625"	1
18	VV33A1N24	Vis mécanique tête pan Phillips 1/4-20 x 3/4" lg	2
19	VW10A10	Rondelle plate diamètre 5/16" S.A.E.	1
20	VW10C173602	Rondelle de nylon	3
21	VW10C241002	Rondelle nylon 5/16" int. x 3/4" ext. x 1/16" ép.	1
22	VW10C263304	Rondelle nylon 0.813 x 1.063 x 0.125	1

Option élévation de pied


Option élévation de pied (Référence seulement : OL230262G-T) (option antivol)

Item	Numéro de pièce	Description	Quantité
1	13-0853G	Support de vis	1
2	13-0956Z	Rondelle pour boulon 3/4"	2
3	23-0357	S.A. Tube actuateur de cuisse	1
4	23-0822G	Couvercle de pied sans <i>Trendelenburg</i> avec cuisse	1
5	25-0634G	S.A. Sommier de cuisse	1
6	M0019	Graisse grade OG 2	-
7	QB4459-00	Butée à bille diamètre 3/4"	1
8	QDFT18-0254	Tube de protection - vis	1
9	QE71-1242	Autocollant mouvement sommier de pied	1
10	QP18-0248	Pivot pour vis de manivelle	2
11	VB15A1N50	Boulon 1/4"-20 x 2 1/4" p.z. grade 5	2
12	VD60B1O1248	Vis à épaulement 3/8" x 2 x 5/16-18	1
13	VE30A1N	Écrou à blocage nylon 1/4-20	4
14	VE52A1O	Écrou antivol 5/16-18	1
15	VG10B0728	Goupille ressort dia. 0.219" x 0.875"	1
16	VG10B0732	Goupille ressort dia. 0.219" x 1.00"	2
17	VG10B0742	Goupille ressort dia. 0.219" x 1.625"	1
18	VVB3A1N24-S	Vis mécanique tête pan torx 1/4-20 x 3/4" lg	2
19	VW10A10	Rondelle plate diamètre 5/16" S.A.E.	1
20	VW10C173602	Rondelle de nylon	3
21	VW10C241002	Rondelle nylon 5/16" int. x 3/4" ext. x 1/16" ép.	1
22	VW10C263304	Rondelle nylon 0.813 x 1.063 x 0.125	1

Sans mouvements optionnels

Référence seulement : OL230263

Rév. 00

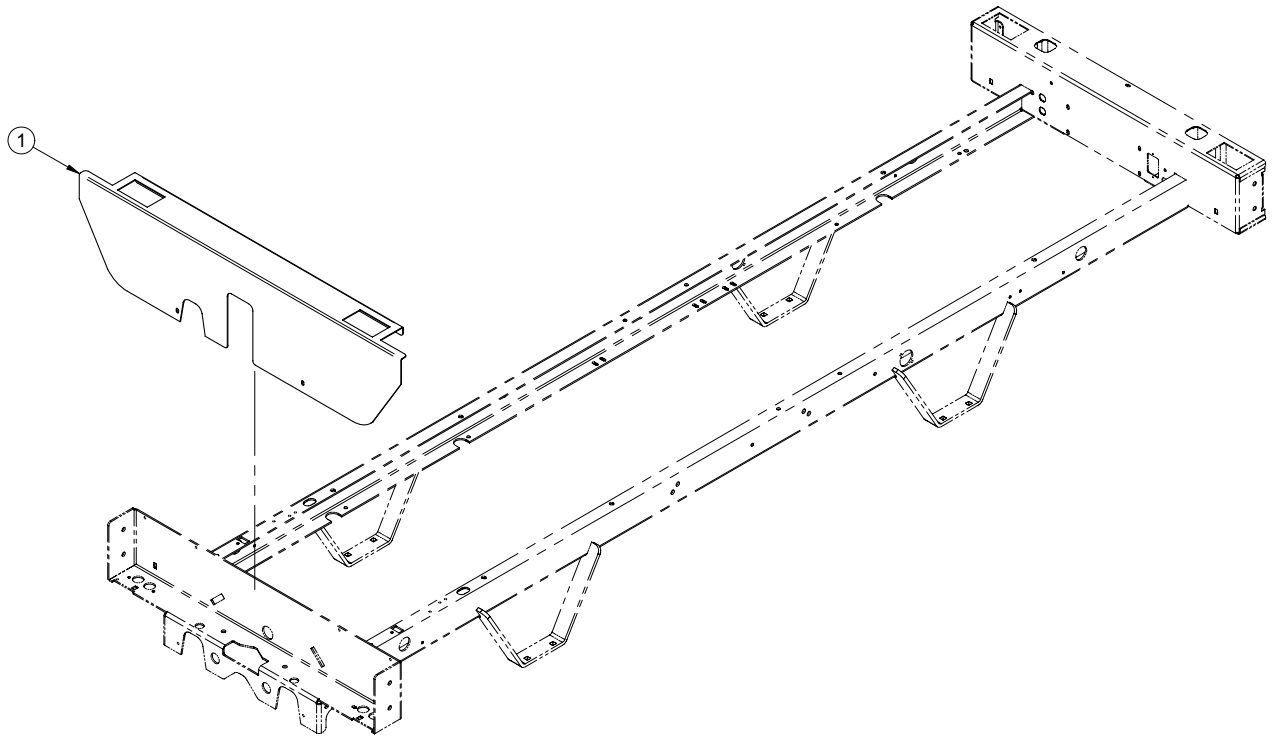

Sans mouvements optionnels (Référence seulement : OL230263G)


Item	Numéro de pièce	Description	Quantité
1	23-0823G	Couvercle de pied sans <i>Trendelenburg</i> ni cuisse	1

[Retour à la table des matières](#)


Notes

Levage tête


Référence seulement : L23-026
Rév. 01

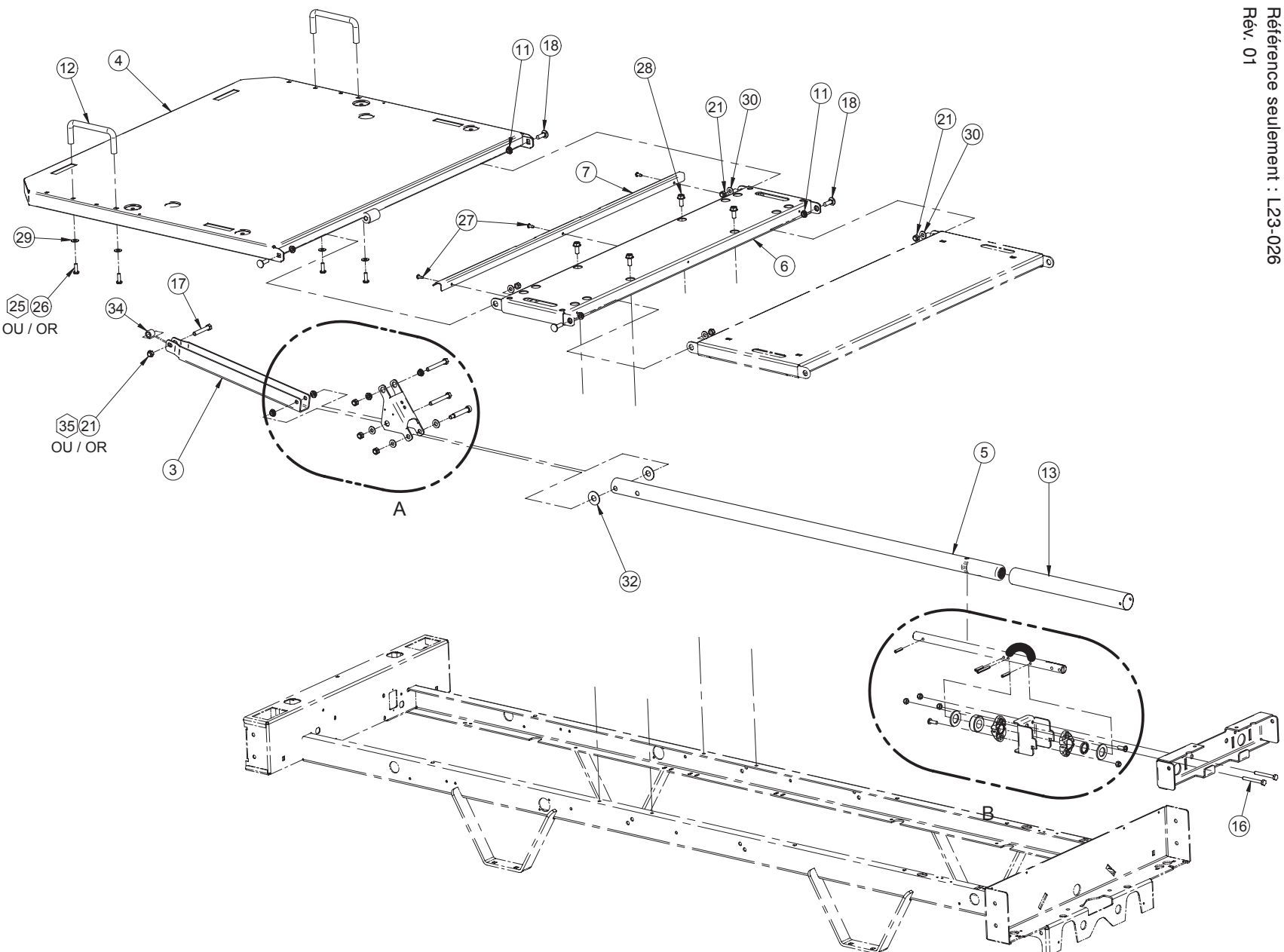

Levage tête

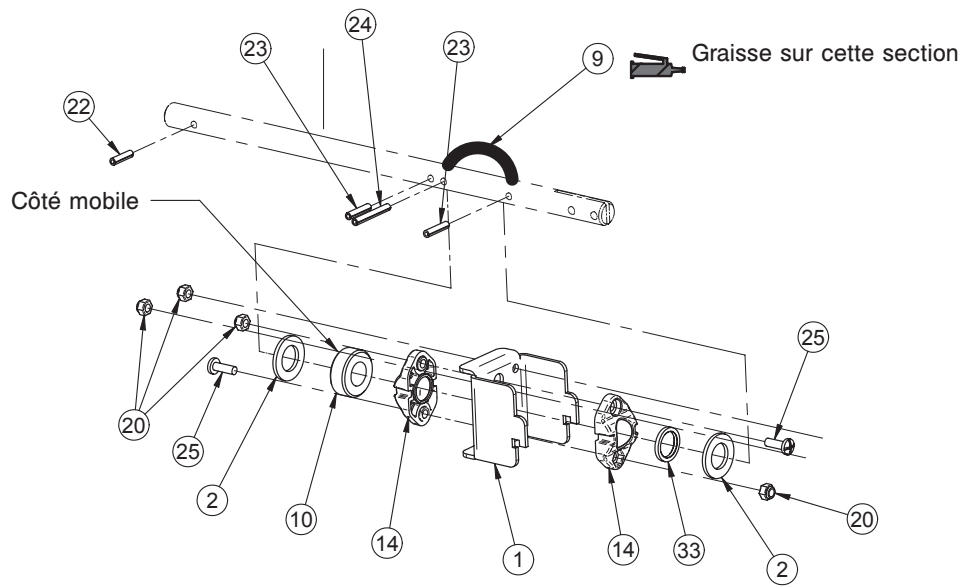

DETAIL B

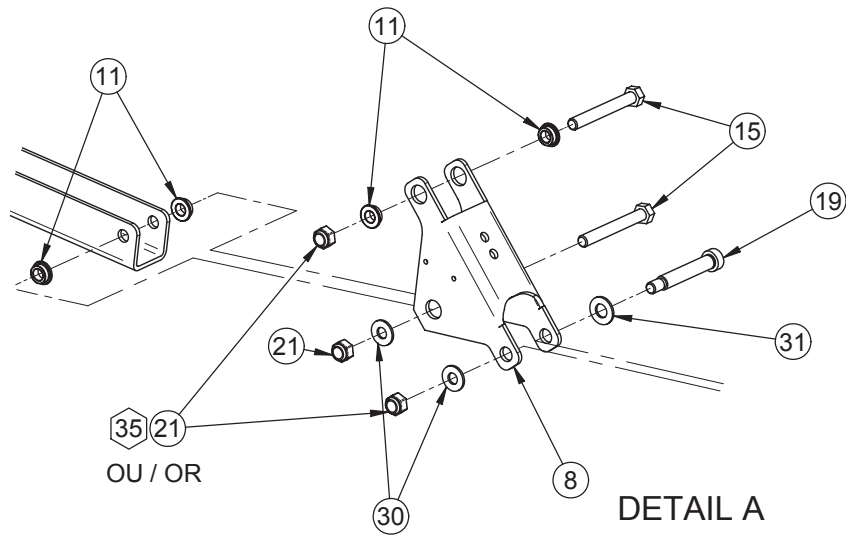

Levage tête

Levage tête (Référence seulement : L23-026G, Rév. 01)

Item	Numéro de pièce	Description	Quantité
1	13-0853G	Support de vis	1
2	13-0956Z	Rondelle pour boulon 3/4"	2
3	20-0223G	Bras de levier section tête	1
4	23-0091G	S.A. Section tête	1
5	23-0356	S.A. Tube vérin de cuisse - FL23M	1
6	23-0640G	S.A. section de centre	1
7	25-0274G	Angle protecteur	1
8	25-0362Z	Levier de sommier	1
9	M0019	Graisse grade OG 2	0.0300 kg
10	QB4459-00	Butée à bille diamètre 3/4"	1
11	QDF17-0020	Entretoise à épaulement	8
12	QDF23-0831C	Arrêt de matelas	2
13	QDFT18-0254	Tube de protection - Vis	1
14	QP18-0248	Pivot pour vis de manivelle	2
15	VB15A1052	Boulon 5/16-18 x 2 1/2" LG gr. 5	2
16	VB15A1N50	Boulon 1/4-20 x 2 1/4" grade 5 p.z.	2
17	VB15A1O48	Boulon 5/16"-18 x 2" LG grade 5	1
18	VB35A1O32	Boulon carrosserie 5/16-18 x 1" grade 5 p.z.	4
19	VD61A1O1248-S	Vis à épaulement zinc et Scotch Grip 3/8" x 2 x 5/16-18	1
20	VE30A1N	Écrou à blocage nylon 1/4-20	4
21	VE30A1O	Écrou à blocage nylon 5/16"-18	8
22	VG10B0728	Goupille à ressort diamètre 0.219" x 0.875"	1
23	VG10B0732	Goupille à ressort diamètre 0.219" x 1.00"	2
24	VG10B0742	Goupille à ressort diamètre 0.219" x 1.625"	1
25	VV33A1N24	Vis mécanique tête pan Phillips 1/4-20 x 3/4" p.z.	2
26	VV33A1N24-S	Vis mécanique tête pan Phillips 1/4-20 x 3/4" LG Scotch Grip	4
27	VV83A9G16	Vis taraudeuse type B tête pan Phillips #10 x 1/2" p.z.	3
28	VVB4A1024	Boulon 5/16-18 x 3/4 filet roulant	4
29	VW10A08	Rondelle plate 1/4 x 1/16	4
30	VW10A10	Rondelle plate diamètre 5/16" S.A.E.	6
31	VW10C122402	Rondelle nylon 0.380" int. x 3/4" ext. 1/16" ép.	1
32	VW10C173602	Rondelle de nylon	2
33	VW10C263304	Rondelle nylon 0.813 x 1.063 x 0.125	1
34	VW60C201320	Espaceur nylon 0.625" diamètre	1

Levage tête


Levage tête (Référence seulement : L23-026G-T, Rév. 01) (option antivol)

Item	Numéro de pièce	Description	Quantité
1	13-0853G	Support de vis	1
2	13-0956Z	Rondelle pour boulon 3/4"	2
3	20-0223G	Bras de levier section tête	1
4	23-0091G	S.A. Section tête	1
5	23-0356	S.A. Tube vérin de cuisse - FL23M	1
6	23-0640G	S.A. section de centre	1
7	25-0274G	Angle protecteur	1
8	25-0362Z	Levier de sommier	1
9	M0019	Graisse grade OG 2	0.0300 kg
10	QB4459-00	Butée à bille diamètre 3/4"	1
11	QDF17-0020	Entretoise à épaulement	8
12	QDF23-0831C	Arrêt de matelas	2
13	QDFT18-0254	Tube de protection - Vis	1
14	QP18-0248	Pivot pour vis de manivelle	2
15	VVB3A1052-S	Boulon 5/16-18 x 2 1/2" LG gr. 5	2
16	VB15A1N50	Boulon 1/4-20 x 2 1/4" grade 5 p.z.	2
17	VVB3A1O48-S	Boulon 5/16"-18 x 2" LG grade 5	1
18	VB35A1O32	Boulon carrosserie 5/16-18 x 1" grade 5 p.z.	4
19	VD61A1O1248-S	Vis à épaulement zinc et Scotch Grip 3/8" x 2 x 5/16-18	1
20	VE30A1N	Écrou à blocage nylon 1/4-20	4
21	VE30A1O	Écrou à blocage nylon 5/16"-18	5
22	VG10B0728	Goupille à ressort diamètre 0.219" x 0.875"	1
23	VG10B0732	Goupille à ressort diamètre 0.219" x 1.00"	2
24	VG10B0742	Goupille à ressort diamètre 0.219" x 1.625"	1
25	VVB3A1N24-S	Vis mécanique tête pan torx 1/4-20 x 3/4" p.z.	6
27	VVB3A0G16	Vis taraudeuse type B tête pan torx #10 x 1/2" p.z.	3
28	VVB4A1024	Boulon 5/16-18 x 3/4 filet roulant	4
29	VW10A08	Rondelle plate 1/4 x 1/16	4
30	VW10A10	Rondelle plate diamètre 5/16" S.A.E.	6
31	VW10C122402	Rondelle nylon 0.380" int. x 3/4" ext. 1/16" ép.	1
32	VW10C173602	Rondelle de nylon	2
33	VW10C263304	Rondelle nylon 0.813 x 1.063 x 0.125	1
34	VW60C201320	Espaceur nylon 0.625" diamètre	1
35	VE52A1O	Écrou antivol 5/16-18	3

Sans option tige soluté

Référence seulement : OL230279

Rév. 00

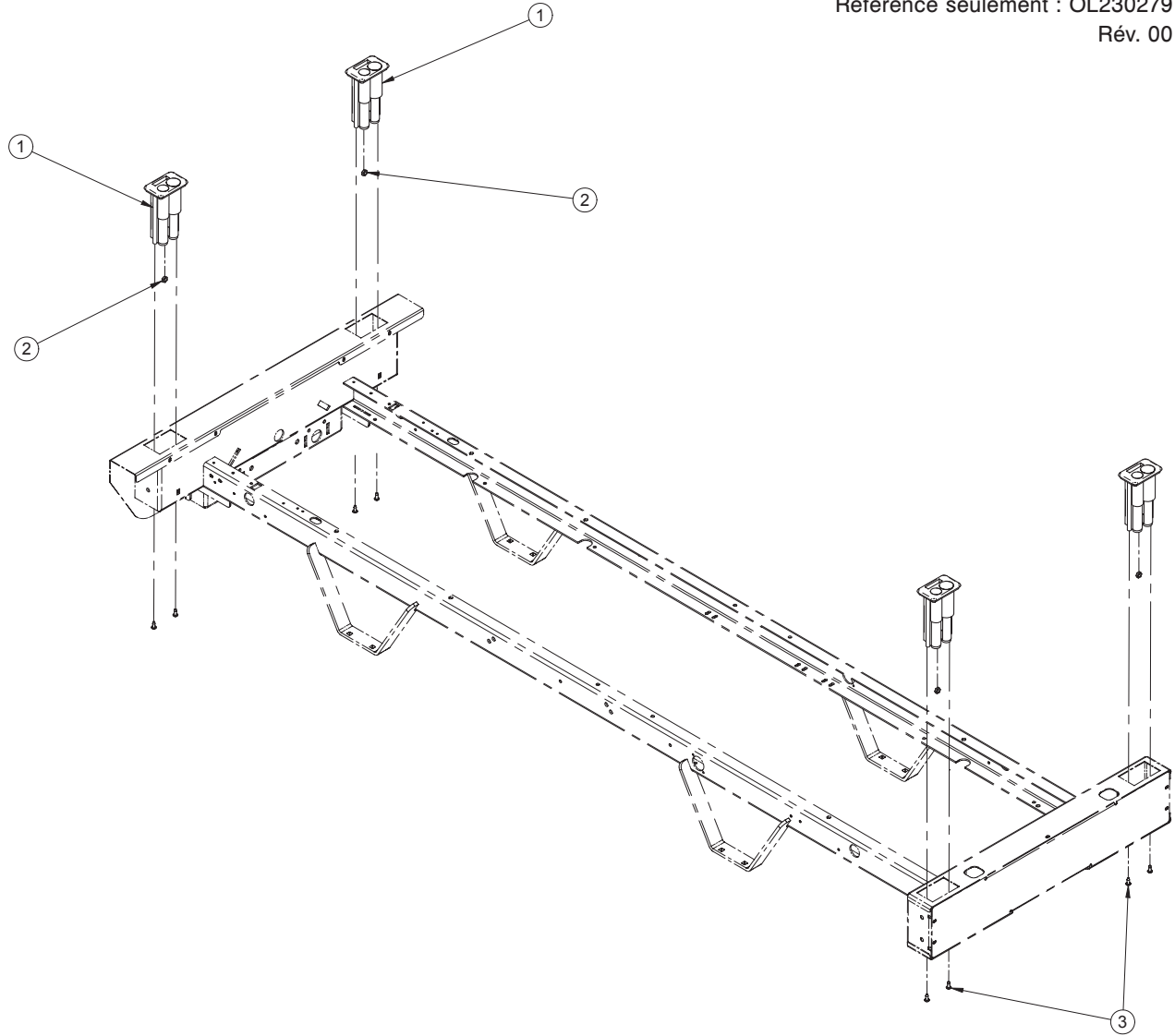

Sans option tige soluté (Référence seulement : OL230279G, Rév. 00)

Item	Numéro de pièce	Description	Quantité
1	QP23-0829	Bloc panneaux sans portte tige	4
2	VE20A1N	Contre-écrou 1/4-20	4
3	VV83A9G16	Vis taraudeuse type B tête pan Phillips #10 x 1/2" p.z.	8

Sans option tige soluté (Référence seulement : OL230279G-T, Rév. 00) (option antivol)


Item	Numéro de pièce	Description	Quantité
1	QP23-0829	Bloc panneaux sans portte tige	4
2	VE20A1N	Contre-écrou 1/4-20	4
3	VVBA0G16	Vis taraudeuse type B tête pan torx #10 x 1/2" p.z.	8

[Retour à la table des matières](#)

Avec option tige porte-soluté

Référence seulement : OL230278

Rév. : 00

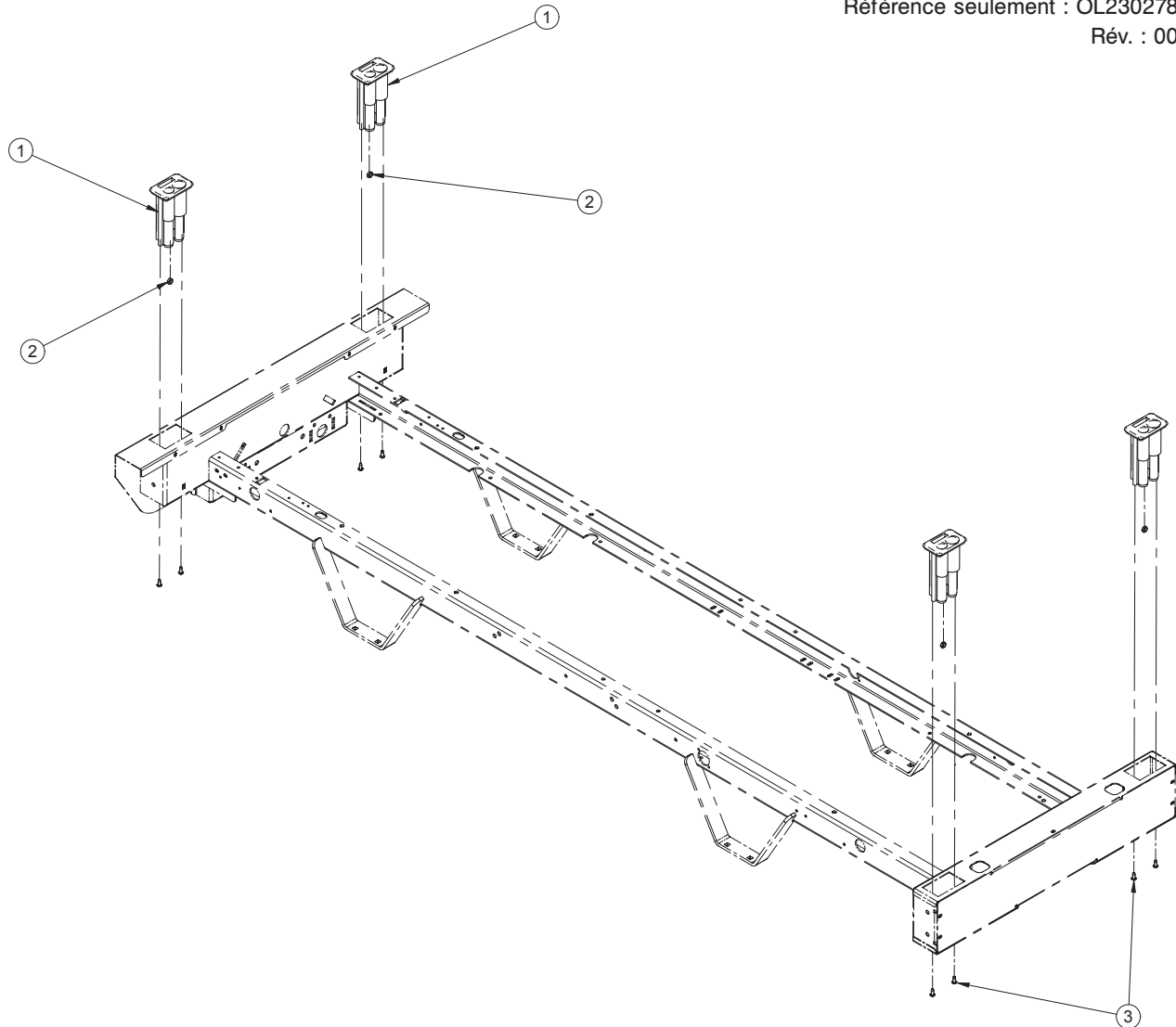

Avec option tige porte-soluté (Référence seulement : OL230278G, Rév. 00)


Item	Numéro de pièce	Description	Quantité
1	QP17-0121-07	Bloc porte-tige	4
2	VE20A1N	Contre-écrou 1/4-20	4
3	VV83A9G16	Vis taraudeuse type B tête pan Phillips #10 x 1/2" p.z.	8

Avec option tige porte-soluté (Référence seulement : OL230278G-T, Rév. 00) (option antivol)

Item	Numéro de pièce	Description	Quantité
1	QP17-0121-07	Bloc porte-tige	4
2	VE20A1N	Contre-écrou 1/4-20	4
3	VVB3A9G16	Vis taraudeuse type B tête pan Phillips #10 x 1/2" p.z.	8

Manivelles fixes

Référence seulement : OL230161
Rév. 04

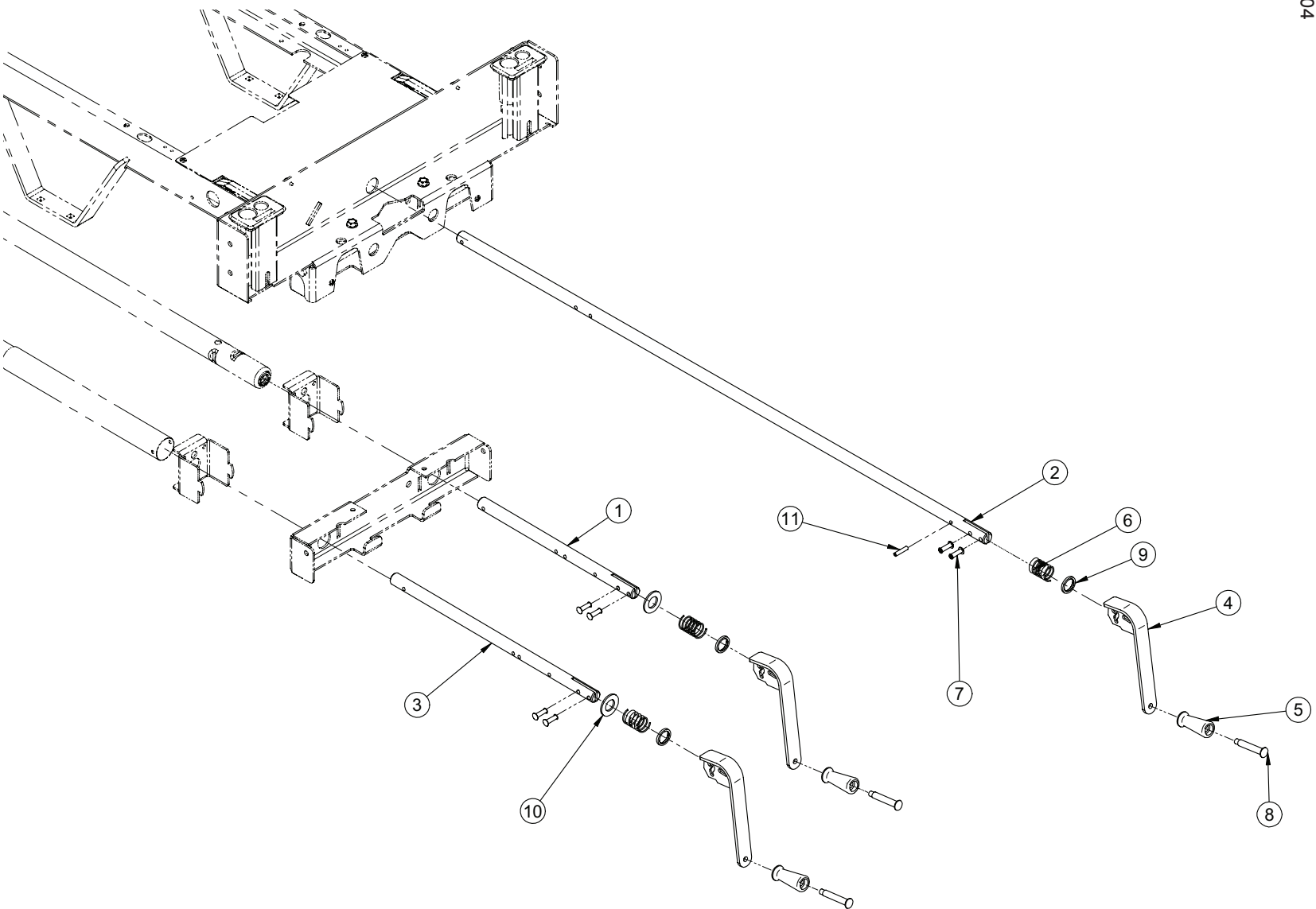


Manivelles fixes

Manivelles fixes (Référence seulement : OL230161, Rév. 03)

Item	Numéro de pièce	Description	Quantité
1	23-0694Z	Vis de vérin de pied (manivelle fixe)	1
2	23-0373Z	Vis de pied du mécanisme d'élévation	1
3	23-0455Z	Vis de la section de tête	1
4	40060C	S.A. Manivelle chromée	3
5	QPN-9438	Poignée de nylon noir	3
6	QRC18134	Ressort de compression 13/16" x 1-7/16" lg x 0.065"	3
7	VR23A0828	Rivet tubulaire 1/4" x 7/8" p.z.	6
8	VR43A9439	Rivet à épaulement	3
9	VW10C263304	Rondelle nylon 13/16" intérieur x 1 1/16" extérieur x 1/8"	3
10	VW10C392403	Rondelle nylon 0.760" x 1.420" x 0.100"	2
11	VG10B0732	Goupille à ressort 7/32" diamètre x 1" lg	1

Manivelle amovible

Référence seulement : OL230162
Rév. 03

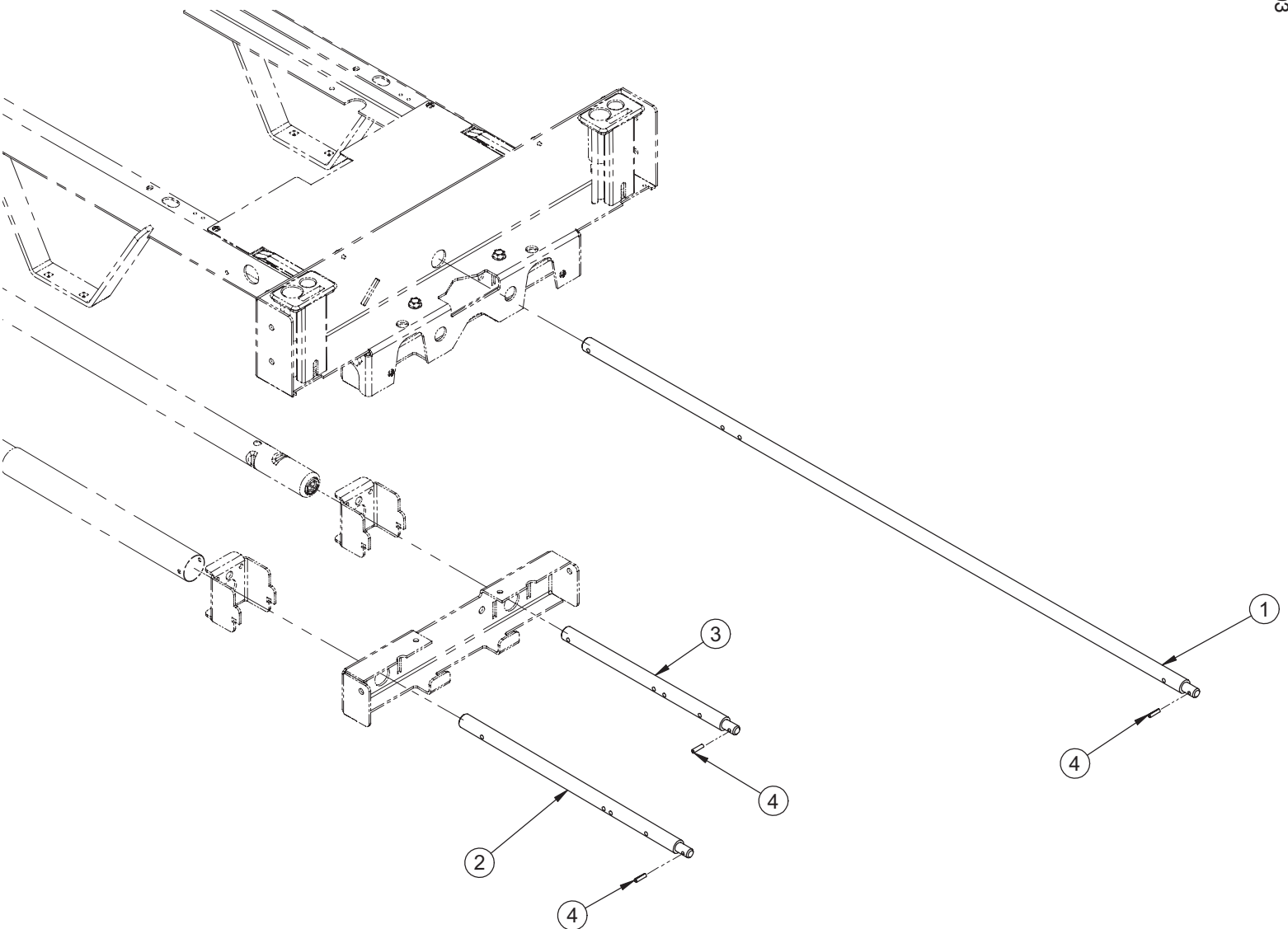


Manivelle amovible

Manivelle amovible (Référence seulement : OL230162, Rév. 02)

Item	Numéro de pièce	Description	Quantité
1	23-0457Z	Vis de pied du mécanisme d'élévation - manivelle amovible	1
2	23-0458Z	Vis de la section de tête - manivelle amovible	1
3	23-0459Z	Vis de la section de cuisse - manivelle amovible	1
4	VG10B0622	Goupille ressort 3/16" diamètre x 11/16" lg	3

Manivelle fixe sans section de cuisse

Référence seulement : OL230269
Rév. 00

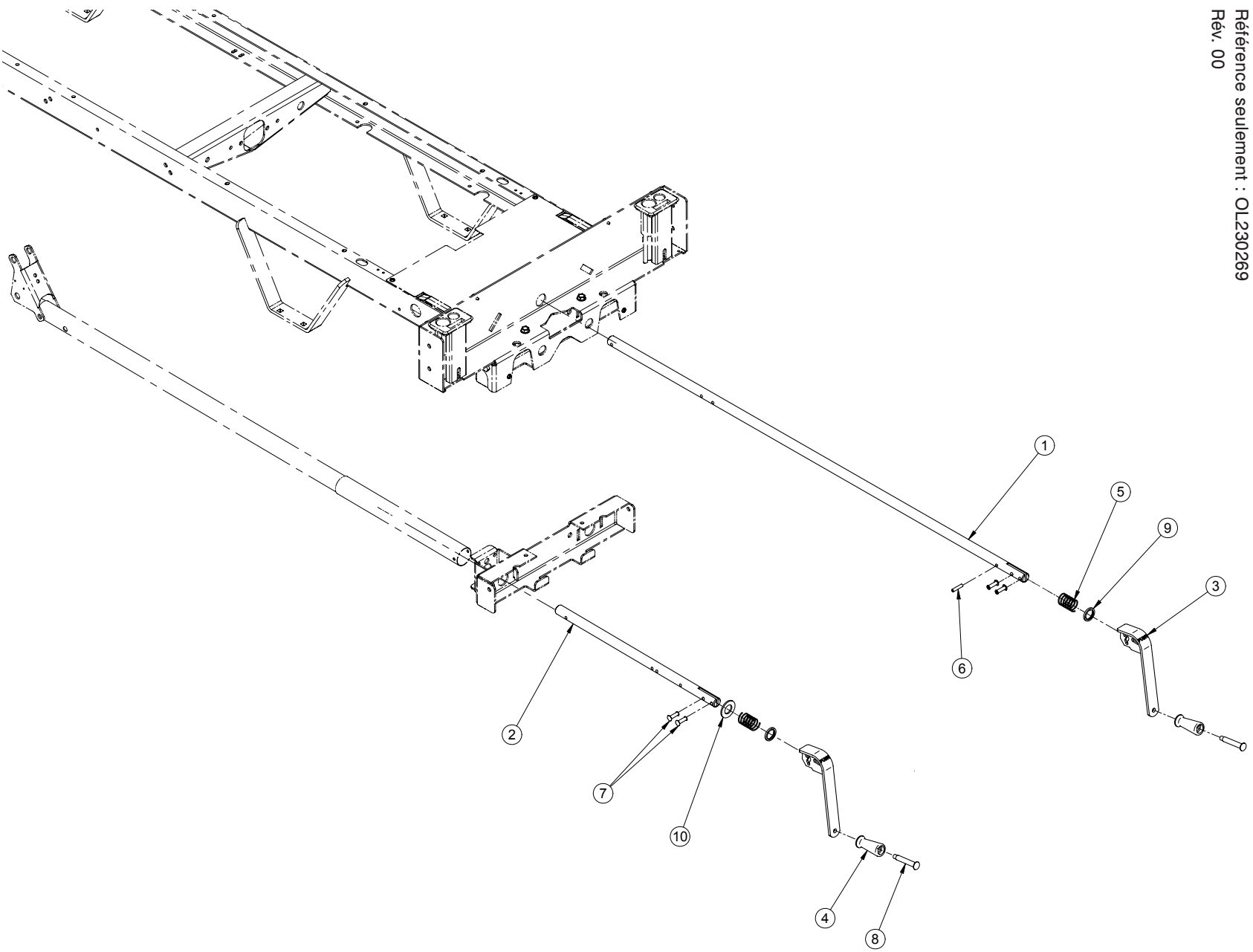

Manivelle fixe sans section de cuisse


Manivelle fixe sans section de cuisse (Référence seulement : OL230269, Rév. 00)

Item	Numéro de pièce	Description	Quantité
1	23-0373Z	Vis centrale de pied	1
2	23-0455Z	Vis de section de tête	1
3	40060C	S.A. manivelle	2
4	QPN-9438	Poignée de nylon noir	2
5	QRC18134	Ressort de manivelle	2
6	VG10B0732	Goupille à ressort diamètre 0.219" x 1.00"	1
7	VR23AO828	Rivet tubulaire 1/4" x 7/8"	4
8	VR43A9439	Rivet à épaulement	2
9	VW10C263304	Rondelle nylon 0.813 x 1.063 x 0.125	2
10	VW10C392403	Rondelle nylon 1.420 x 0.760 x 0.1	1

Manivelle amovible sans section de cuisse

Référence seulement : OL230270

Rév. 00

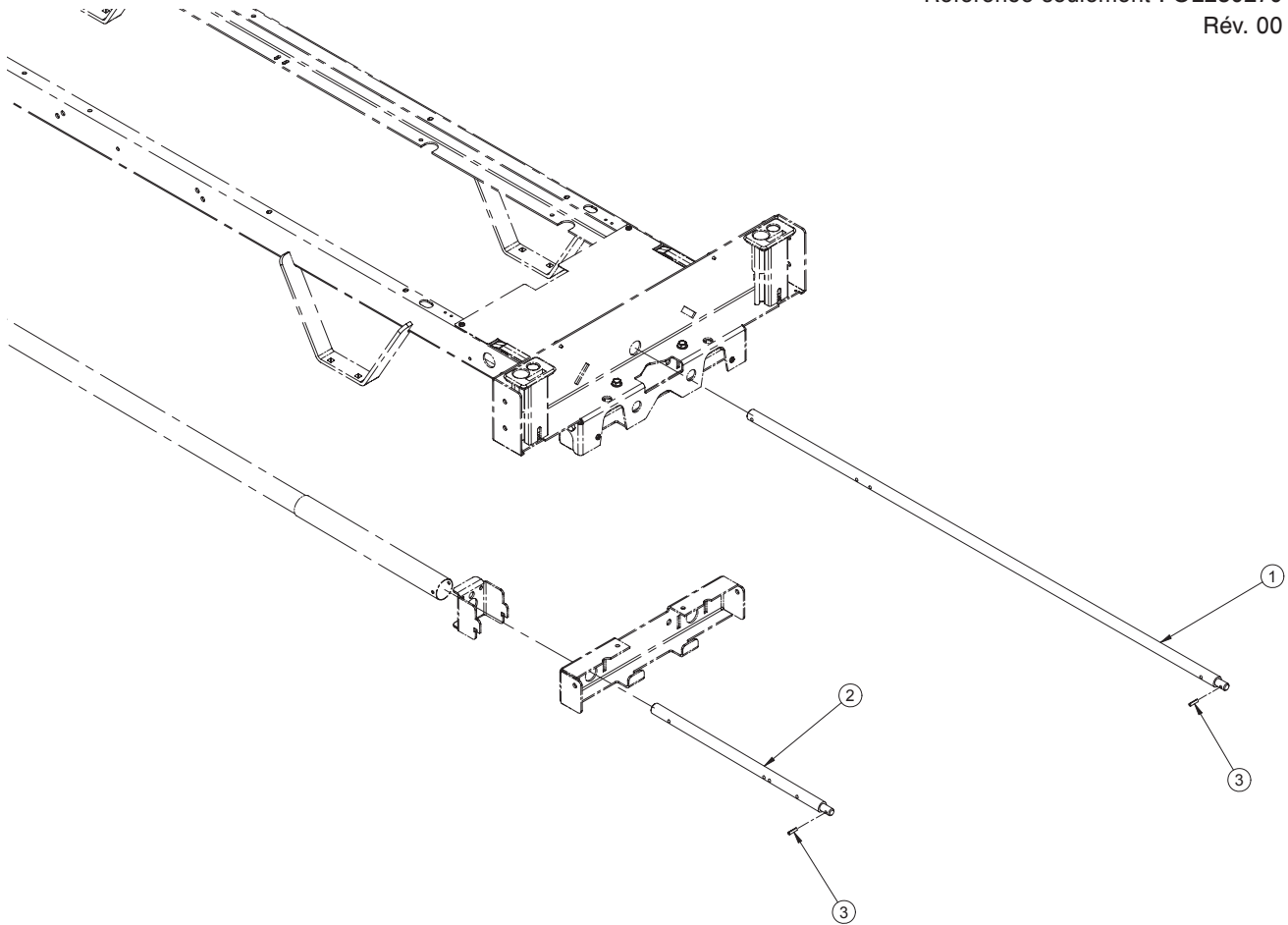

Manivelle amovible sans section de cuisse (Référence seulement : OL230270, Rév. 00)


Item	Numéro de pièce	Description	Quantité
1	23-0457Z	Vis centrale de pied - amovible	1
2	23-0458Z	Vis de section de tête - amovible	1
3	VG10B0622	Goupille à ressort 3/16 x 11/16"	2

[Retour à la table des matières](#)

Manivelle pour option manivelle amovible

Référence seulement : OL230228

Rév. 00

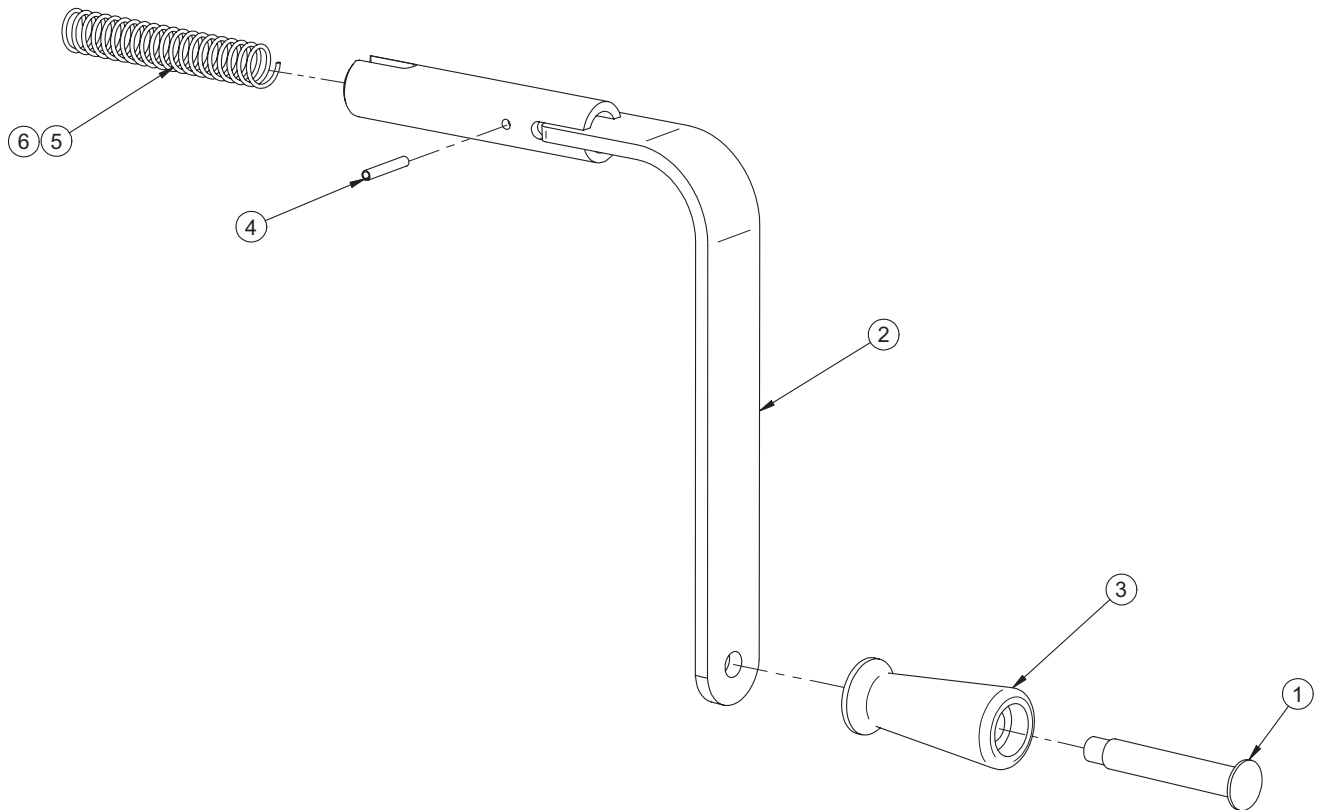


Manivelle pour option manivelle amovible (Référence seulement : OL230228, Rév. 00)

Item	Numéro de pièce	Description	Quantité
1	VR43A9439	Rivet à épaulement	1
2	16142C	S.A. Manivelle chromée	1
3	QPN-9438	Poignée de nylon noir	1
4	VG10B0424	Goupille ressort 1/8" x 3/4"	1
5	QRC16887	Ressort de compression	1
6	M0019	Graisse Péto Canada OG 2	0.0300 kg
7	ED2079	Enveloppe JIFFY bulle d'air	1

Sommier de pied court avec crochets

Référence seulement : OL230289
Rév. 02

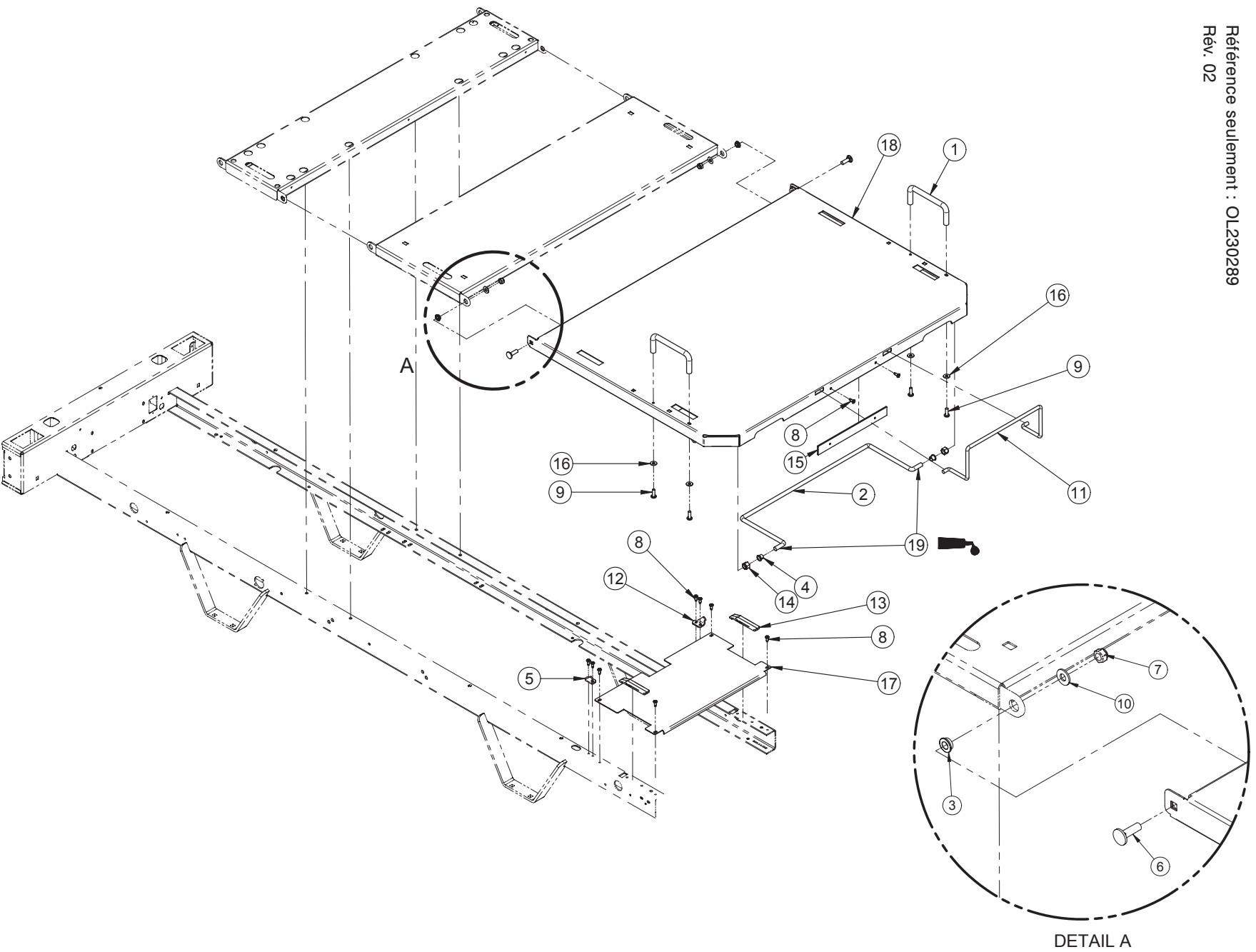

Retour à la table des matières

Sommier de pied court avec crochets

Sommier de pied court avec crochets (Référence seulement : OL230289G, Rév. 02)


Item	Numéro de pièce	Description	Quantité
1	QDF23-0831C	Arrêt de matelas	2
2	23-0837G	Tige de soutien filetée	1
3	QDF17-0020	Entretoise à épaulement	2
4	QPNI2404	Coussinet en nylon avec épaulement diamètre 3/8"	2
5	28-0461Z	Crochet droit	1
6	VB35A1O32	Boulon carrosserie 5/16-18 x 1" grade 5 p.z.	2
7	VE30A1O	Écrou à blocage nylon 5/16"-18	2
8	VV83A9G16	Vis taraudeuse type B tête pan Phillips #10 x 1/2" p.z.	10
9	VV33A1N24-S	Vis mécanique tête pan Phillips 1/4-20 x 3/4" LG Scotch Grip	4
10	VW10A10	Rondelle plate diamètre 5/16" S.A.E.	2
11	17-0211G	Arrêt de matelas de pied	1
12	28-0468Z	Crochet gauche	1
13	QP23-0257	Glisseur de sommier	2
14	VE30A1P	Écrou à blocage nylon 3/8-16	2
15	23-0838G	Barrure arrêt de matelas de pied	1
16	VW10A08	Rondelle plate 1/4 x 1/16	4
17	23-0167G	Tôle de recouvrement de pied	1
18	23-0705G	S.A. Section de pied	1
19	M0008	Ciment à filets (bleu)	-

Sommier de pied court avec crochets (Référence seulement : OL230289G-T, Rév. 02) (option antivol)

Item	Numéro de pièce	Description	Quantité
1	QDF23-0831C	Arrêt de matelas	2
2	23-0837G	Tige de soutien filetée	1
3	QDF17-0020	Entretoise à épaulement	2
4	QPNI2404	Coussinet en nylon avec épaulement diamètre 3/8"	2
5	28-0461Z	Crochet droit	1
6	VB35A1O32	Boulon carrosserie 5/16-18 x 1" grade 5 p.z.	2
7	VE30A1O	Écrou à blocage nylon 5/16"-18	2
8	VVB3A0G16	Vis taraudeuse type B tête pan torx #10 x 1/2" p.z.	10
9	VVB3A1N24-S	Vis mécanique tête pan torx 1/4-20 x 3/4" LG Scotch Grip	4
10	VW10A10	Rondelle plate diamètre 5/16" S.A.E.	2
11	17-0211G	Arrêt de matelas de pied	1
12	28-0468Z	Crochet gauche	1
13	QP23-0257	Glisseur de sommier	2
14	VE52A1P	Écrou antivol 3/8-16	2
15	23-0838G	Barrure arrêt de matelas de pied	1
16	VW10A08	Rondelle plate 1/4 x 1/16	4
17	23-0167G	Tôle de recouvrement de pied	1
18	23-0705G	S.A. Section de pied	1
19	M0008	Ciment à filets (bleu)	-

Sommier de pied court sans crochets

Référence seulement : OL230290
Rév. 02

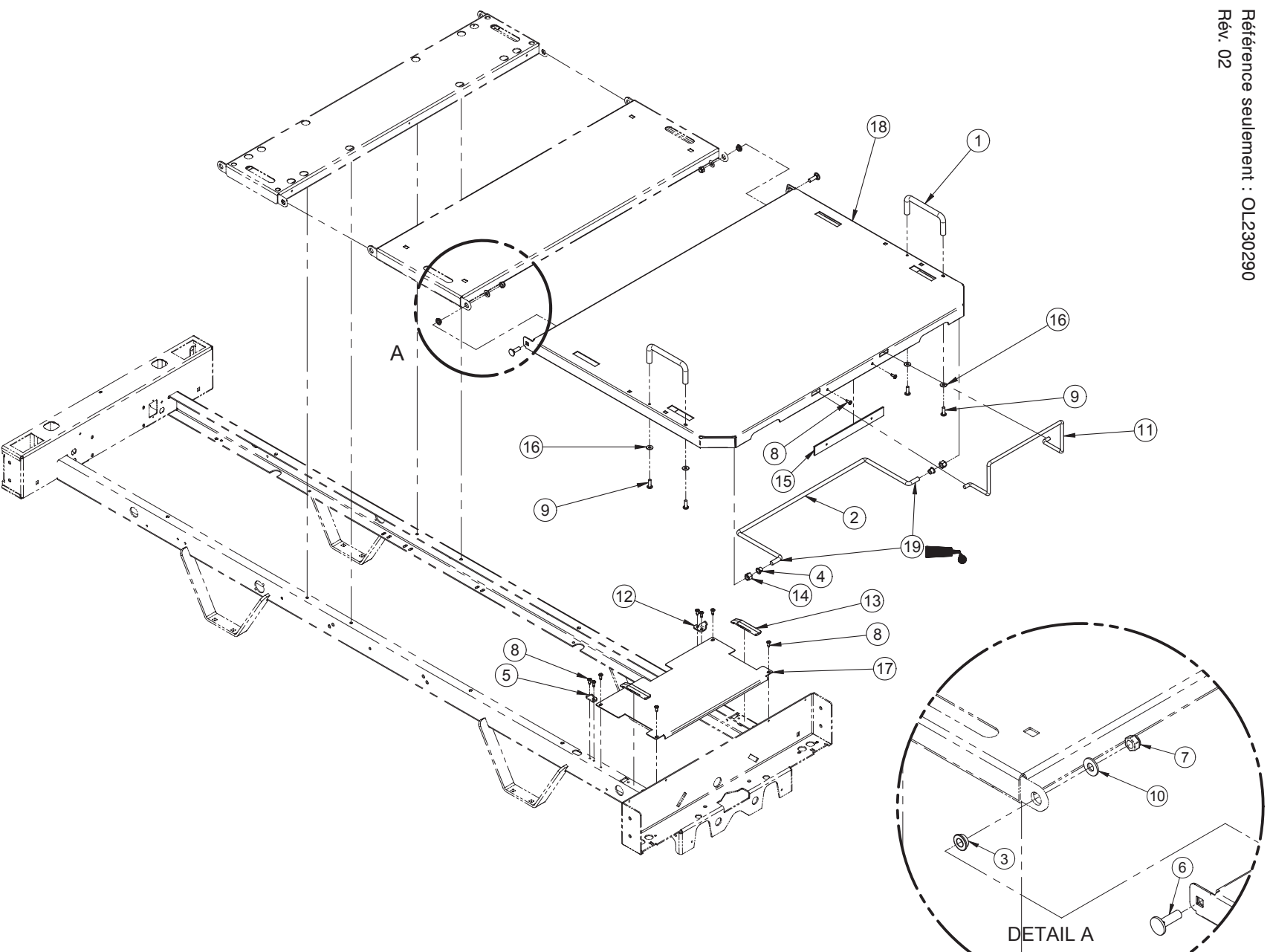

Retour à la table des matières

Sommier de pied court sans crochets

Sommier de pied court sans crochets (Référence seulement : OL230290G, Rév. 02)


Item	Numéro de pièce	Description	Quantité
1	QDF23-0831C	Arrêt de matelas	2
2	23-0837G	Tige de soutien filetée	1
3	QDF17-0020	Entretoise à épaulement	2
4	QPNI2404	Coussinet en nylon avec épaulement diamètre 3/8"	2
5	28-0461Z	Crochet droit	1
6	VB35A1O32	Boulon carrosserie 5/16-18 x 1" grade 5 p.z.	2
7	VE30A1O	Écrou à blocage nylon 5/16"-18	2
8	VV83A9G16	Vis taraudeuse type B tête pan Phillips #10 x 1/2" p.z.	10
9	VV33A1N24-S	Vis mécanique tête pan Phillips 1/4-20 x 3/4" LG Scotch Grip	4
10	VW10A10	Rondelle plate diamètre 5/16" S.A.E.	2
11	17-0211G	Arrêt de matelas de pied	1
12	28-0468Z	Crochet gauche	1
13	QP23-0257	Glisseur de sommier	2
14	VE30A1P	Écrou à blocage nylon 3/8-16	2
15	23-0838G	Barrure arrêt de matelas de pied	1
16	VW10A08	Rondelle plate 1/4 x 1/16	4
17	23-0167G	Tôle de recouvrement de pied	1
18	23-0845G	S.A. Section de pied sans crochets	1
19	M0008	Ciment à filets (bleu)	-

Sommier de pied court sans crochets (Référence seulement : OL230290G-T, Rév. 02) (option antivol)

Item	Numéro de pièce	Description	Quantité
1	QDF23-0831C	Arrêt de matelas	2
2	23-0837G	Tige de soutien filetée	1
3	QDF17-0020	Entretoise à épaulement	2
4	QPNI2404	Coussinet en nylon avec épaulement diamètre 3/8"	2
5	28-0461Z	Crochet droit	1
6	VB35A1O32	Boulon carrosserie 5/16-18 x 1" grade 5 p.z.	2
7	VE30A1O	Écrou à blocage nylon 5/16"-18	2
8	VVB3A0G16	Vis taraudeuse type B tête pan torx #10 x 1/2" p.z.	10
9	VVB3A1N24-S	Vis mécanique tête pan torx 1/4-20 x 3/4" LG Scotch Grip	4
10	VW10A10	Rondelle plate diamètre 5/16" S.A.E.	2
11	17-0211G	Arrêt de matelas de pied	1
12	28-0468Z	Crochet gauche	1
13	QP23-0257	Glisseur de sommier	2
14	VE52A1P	Écrou antivol 3/8-16	2
15	23-0838G	Barrure arrêt de matelas de pied	1
16	VW10A08	Rondelle plate 1/4 x 1/16	4
17	23-0167G	Tôle de recouvrement de pied	1
18	23-0845G	S.A. Section de pied sans crochets	1
19	M0008	Ciment à filets (bleu)	-

Sommier de pied long avec crochets

Référence seulement : OL230291
Rév. 02

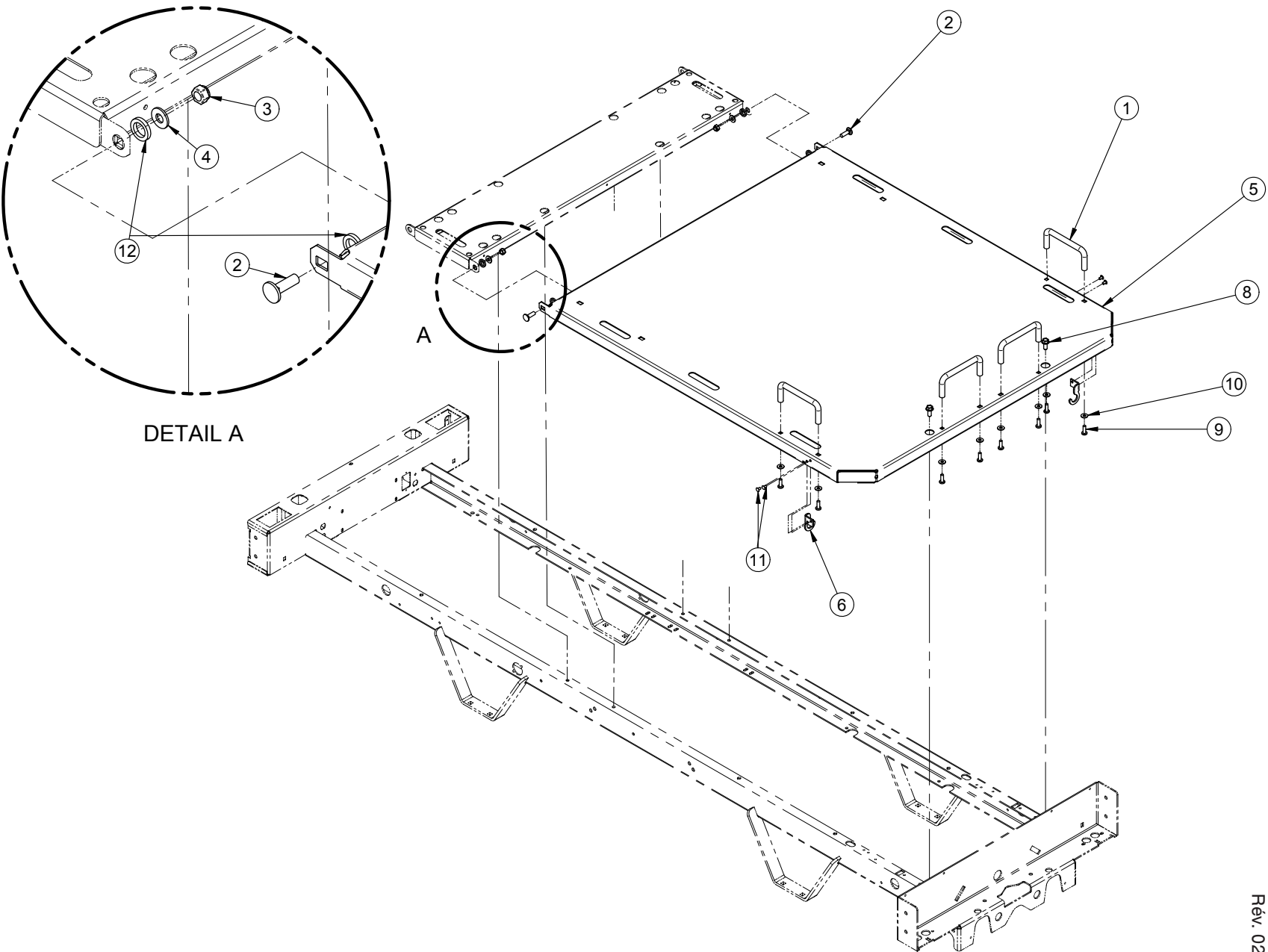

Sommier de pied long avec crochets

Sommier de pied long avec crochets (Référence seulement : OL230291G, Rév. 02)


Item	Numéro de pièce	Description	Quantité
1	QDF23-0831C	Arrêt de matelas	4
2	VB35A1O32	Boulon de carrosserie 5/16-18 x 1" grade 5 p.z.	2
3	VE30A1O	Écrou à blocage nylon 5/16"-18	2
4	VW10A10	Rondelle plate diamètre 5/16" S.A.E.	2
5	23-0828G	S.A. Sommier fixe	1
6	23-0847G	Crochet	2
8	VVB4A1024	Boulon 5/16-18 x 3/4 filet roulant	2
9	VV33A1N24-S	Vis mécanique tête pan Phillips 1/4-20 x 3/4" LG Scotch Grip	8
10	VW10A08	Rondelle plate 1/4 x 1/16	8
11	VR11H64	Rivet «POP» 3-16 long 0.310 tête dôme	4
12	VW10C162404	Rondelle nylon 0.505" int. x 3/4" ext. x 1/8" ép.	4

Sommier de pied long avec crochets (Référence seulement : OL230291G-T, Rév. 02) (option antivol)

Item	Numéro de pièce	Description	Quantité
1	QDF23-0831C	Arrêt de matelas	4
2	VB35A1O32	Boulon de carrosserie 5/16-18 x 1" grade 5 p.z.	2
3	VE30A1O	Écrou à blocage nylon 5/16"-18	2
4	VW10A10	Rondelle plate diamètre 5/16" S.A.E.	2
5	23-0828G	S.A. Sommier fixe	1
6	23-0847G	Crochet	2
8	VVB4A1024	Boulon 5/16-18 x 3/4 filet roulant	2
9	VVB3A1N24-S	Vis mécanique tête pan torx 1/4-20 x 3/4" LG Scotch Grip	8
10	VW10A08	Rondelle plate 1/4 x 1/16	8
11	VR11H64	Rivet «POP» 3-16 long 0.310 tête dôme	4
12	VW10C162404	Rondelle nylon 0.505" int. x 3/4" ext. x 1/8" ép.	4

Sommier de pied long sans crochets

Référence seulement : OL230292
Rév. 02

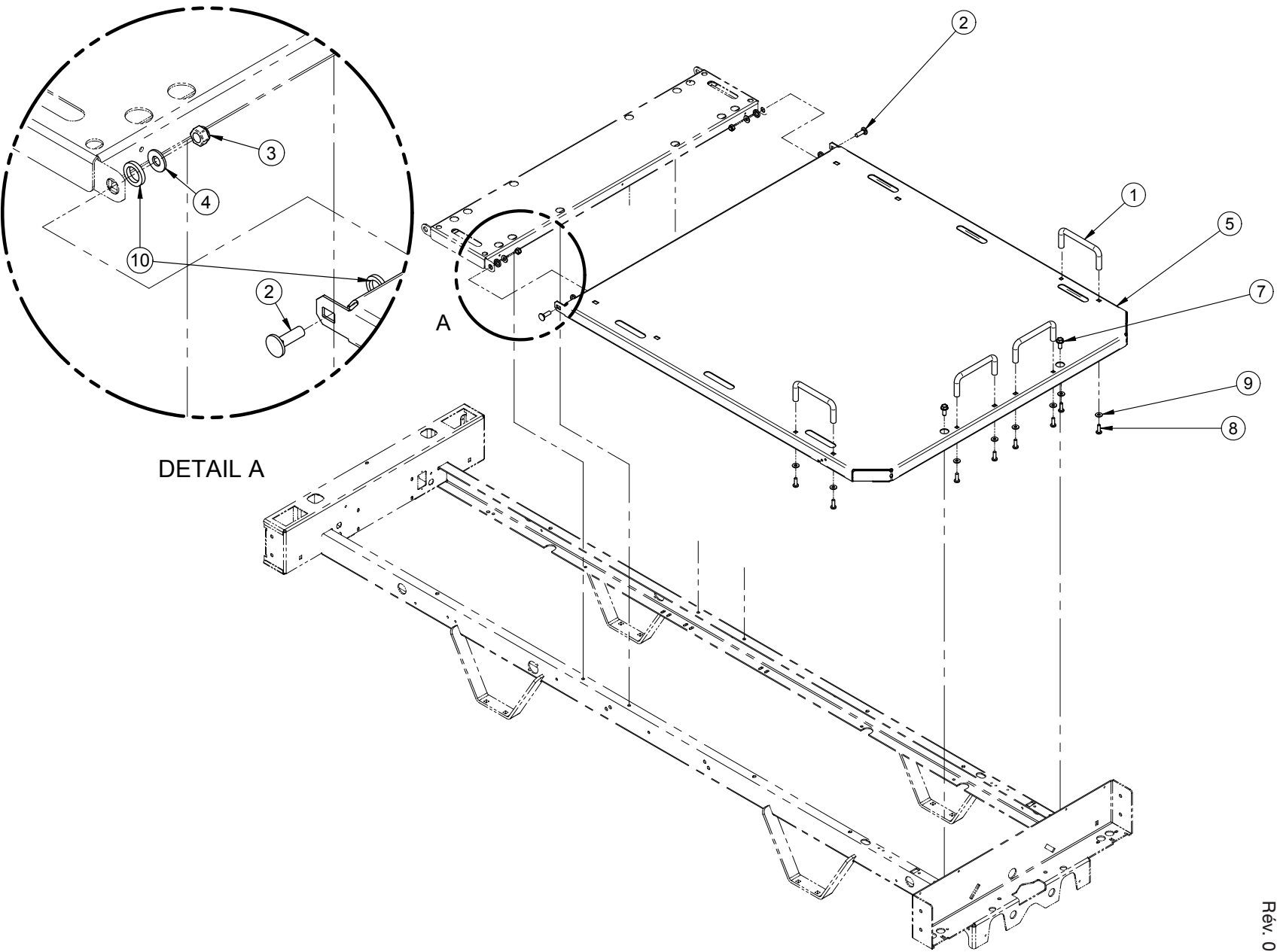

Sommier de pied long sans crochets

Sommier de pied long sans crochets (Référence seulement : OL230292G, Rév. 02)


Item	Numéro de pièce	Description	Quantité
1	QDF23-0831C	Arrêt de matelas	4
2	VB35A1O32	Boulon de carrosserie 5/16-18 x 1" grade 5 p.z.	2
3	VE30A1O	Écrou à blocage nylon 5/16"-18	2
4	VW10A10	Rondelle plate diamètre 5/16" S.A.E.	2
5	23-0828G	S.A. Sommier fixe	1
7	VVB4A1024	Boulon 5/16-18 x 3/4 filet roulant	2
8	VV33A1N24-S	Vis mécanique tête pan Phillips 1/4-20 x 3/4" LG Scotch Grip	8
9	VW10A08	Rondelle plate 1/4 x 1/16	8
10	VW10C162404	Rondelle nylon 0.505" int. x 3/4" ext. x 1/8" ép.	4

Sommier de pied long sans crochets (Référence seulement : OL230292G-T, Rév. 02) (option antivol)

Item	Numéro de pièce	Description	Quantité
1	QDF23-0831C	Arrêt de matelas	4
2	VB35A1O32	Boulon de carrosserie 5/16-18 x 1" grade 5 p.z.	2
3	VE30A1O	Écrou à blocage nylon 5/16"-18	2
4	VW10A10	Rondelle plate diamètre 5/16" S.A.E.	2
5	23-0828G	S.A. Sommier fixe	1
7	VVB4A1024	Boulon 5/16-18 x 3/4 filet roulant	2
8	VVB3A1N24-S	Vis mécanique tête pan torx 1/4-20 x 3/4" LG Scotch Grip	8
9	VW10A08	Rondelle plate 1/4 x 1/16	8
10	VW10C162404	Rondelle nylon 0.505" int. x 3/4" ext. x 1/8" ép.	4


Autocollants anglais seulement

Référence seulement : OL230295
Rév. 00

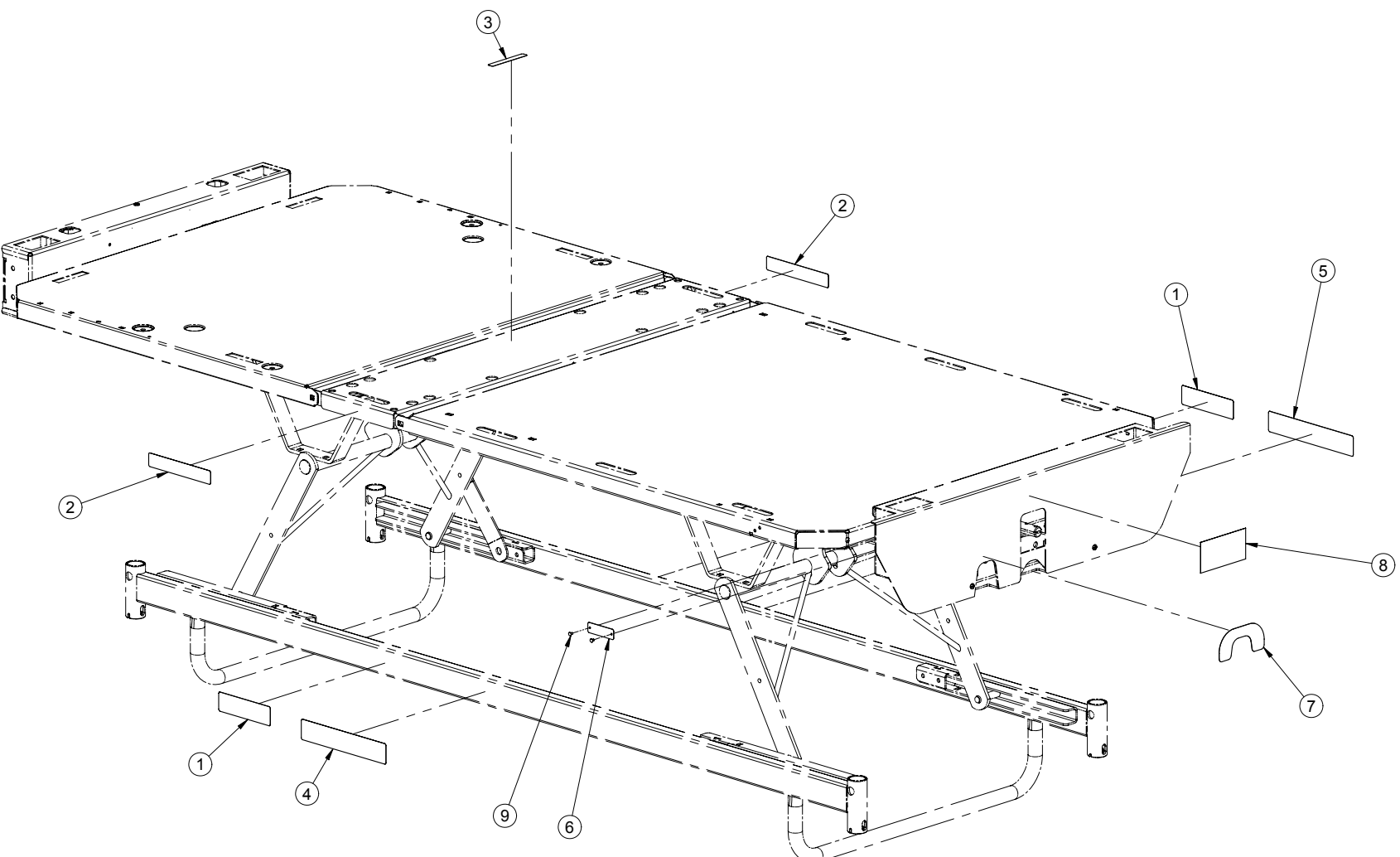

[Retour à la table des matières](#)

Autocollants anglais seulement

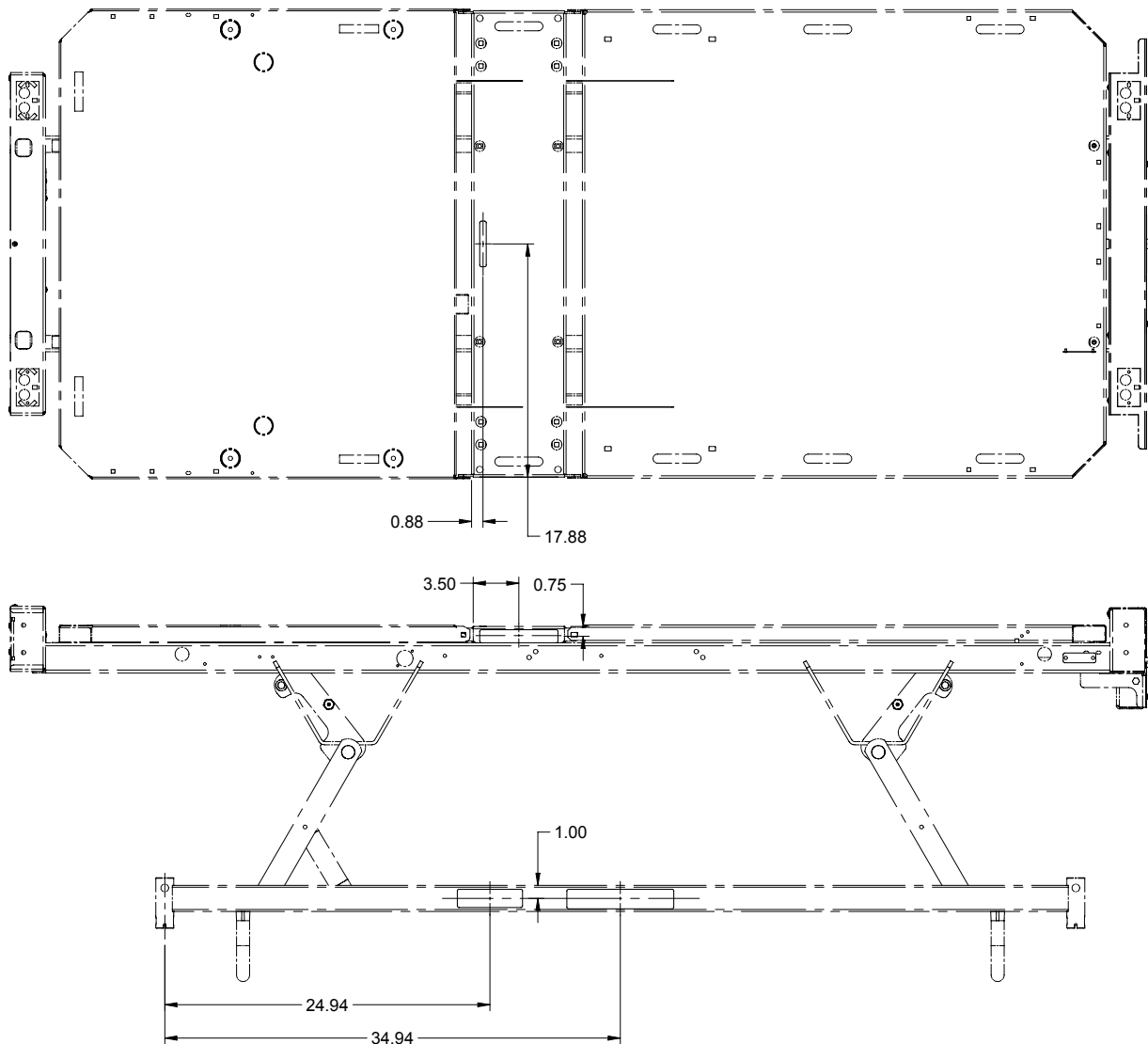


Autocollants anglais seulement (Référence seulement : OL230295, Rév. 00)


Item	Numéro de pièce	Description	Quantité
1	QE71-0346	Autocollant -Stryker	2
2	QE71-0547	Autocollant -Charge maximale	2
3	QE71-0709-E	Autocollant - Épaisseur maximale du matelas	1
4	QE71-0721-E	Autocollant - Positions pédales droit	1
5	QE71-0722-E	Autocollant - Positions pédales gauche	1
6	QE71-1241	Autocollant - Mouvement sommier tête	1
7	QE71-1243	Autocollant - Mouvement vertical du lit	1
8	QE71-1245-T	Plaque numéro de série	1
9	VR11H43	Rivet «POP» diamètre 1-8-Long 0.220 tête dôme	2

Autocollants anglais/espagnol

Référence seulement : OL2390294
Rév. 00

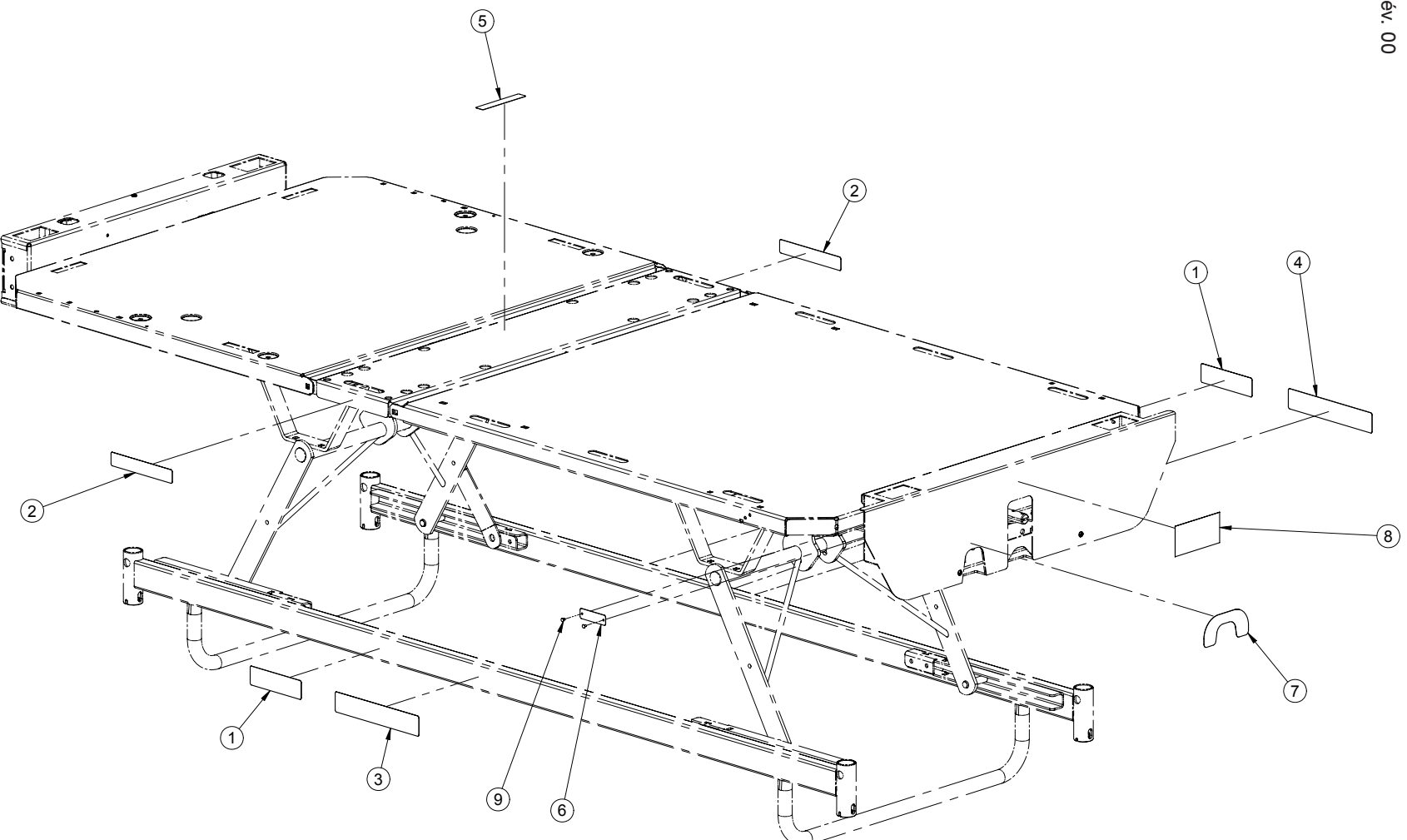

Autocollants anglais/espagnol

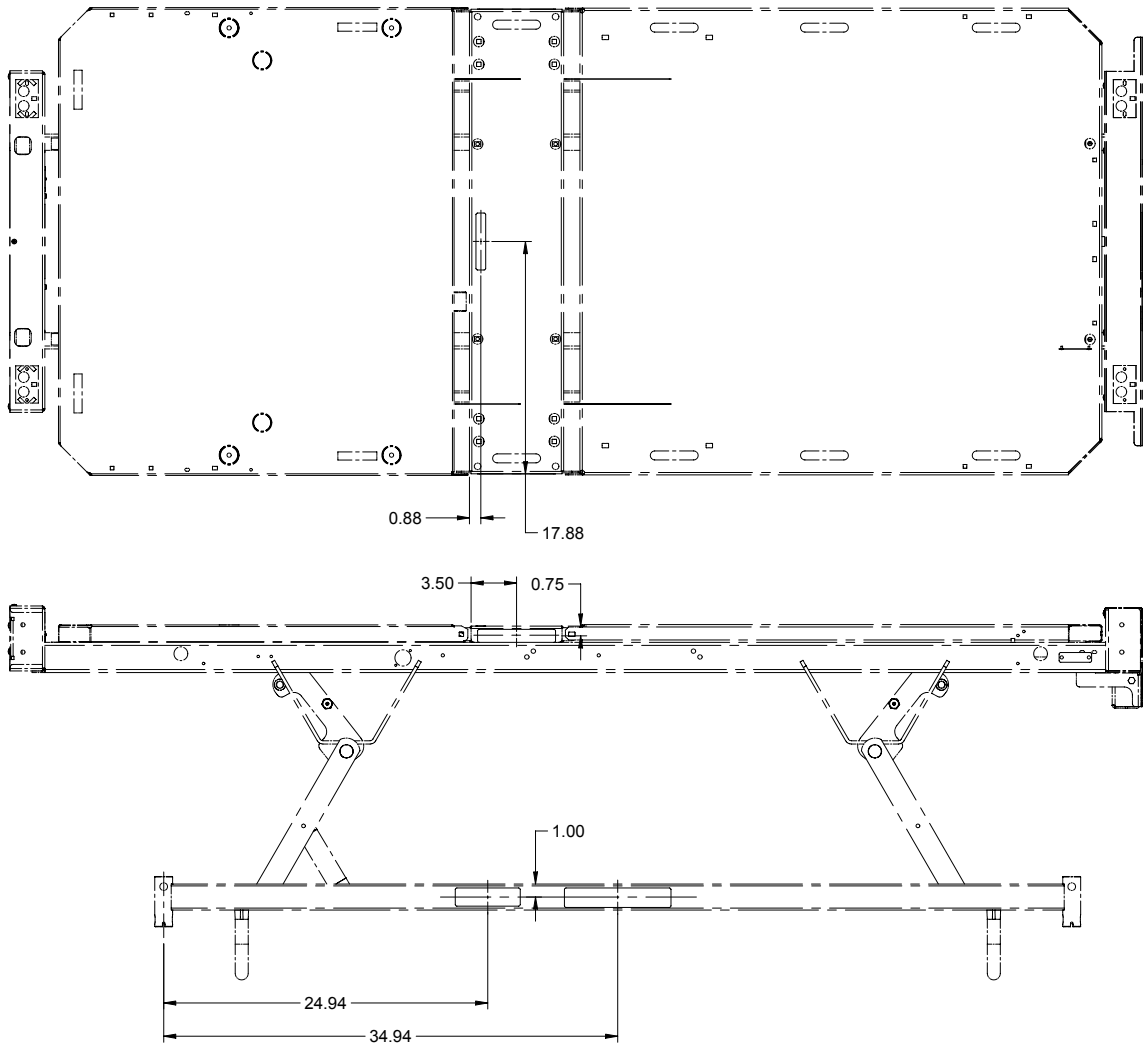


Autocollants anglais/espagnol (Référence seulement : OL230294, Rév. 00)


Item	Numéro de pièce	Description	Quantité
1	QE71-0346	Autocollant - STRYKER	2
2	QE71-0547	Autocollant - Charge maximum	2
3	QE71-0739-T	Autocollant - Positions des pédales droite	1
4	QE71-0740-T	Autocollant - Positions des pédales gauche	1
5	QE71-0741-T	Autocollant - Épaisseur maximum du matelas	1
6	QE71-1241	Autocollant - Mouvement sommier de tête	1
7	QE71-1243	Autocollant - Mouvement vertical du lit	1
8	QE71-1245-T	Plaque numéro de série	1
9	VR11H43	Rivet «POP» diamètre 1-8-Long 0.220 tête dôme	2

Autocollants français/anglais

Référence seulement : OL230293
Rév. 00

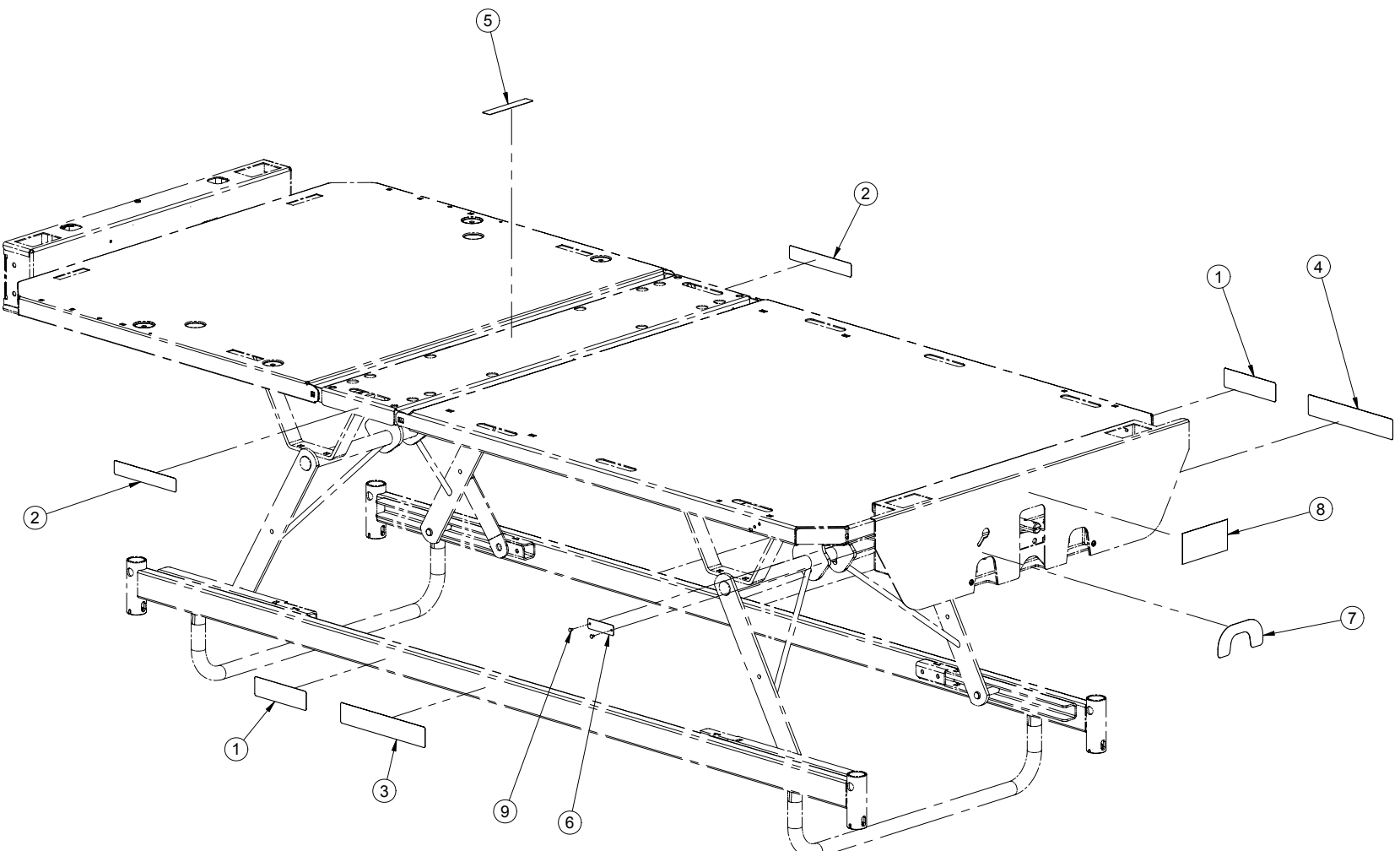

Autocollants français/anglais

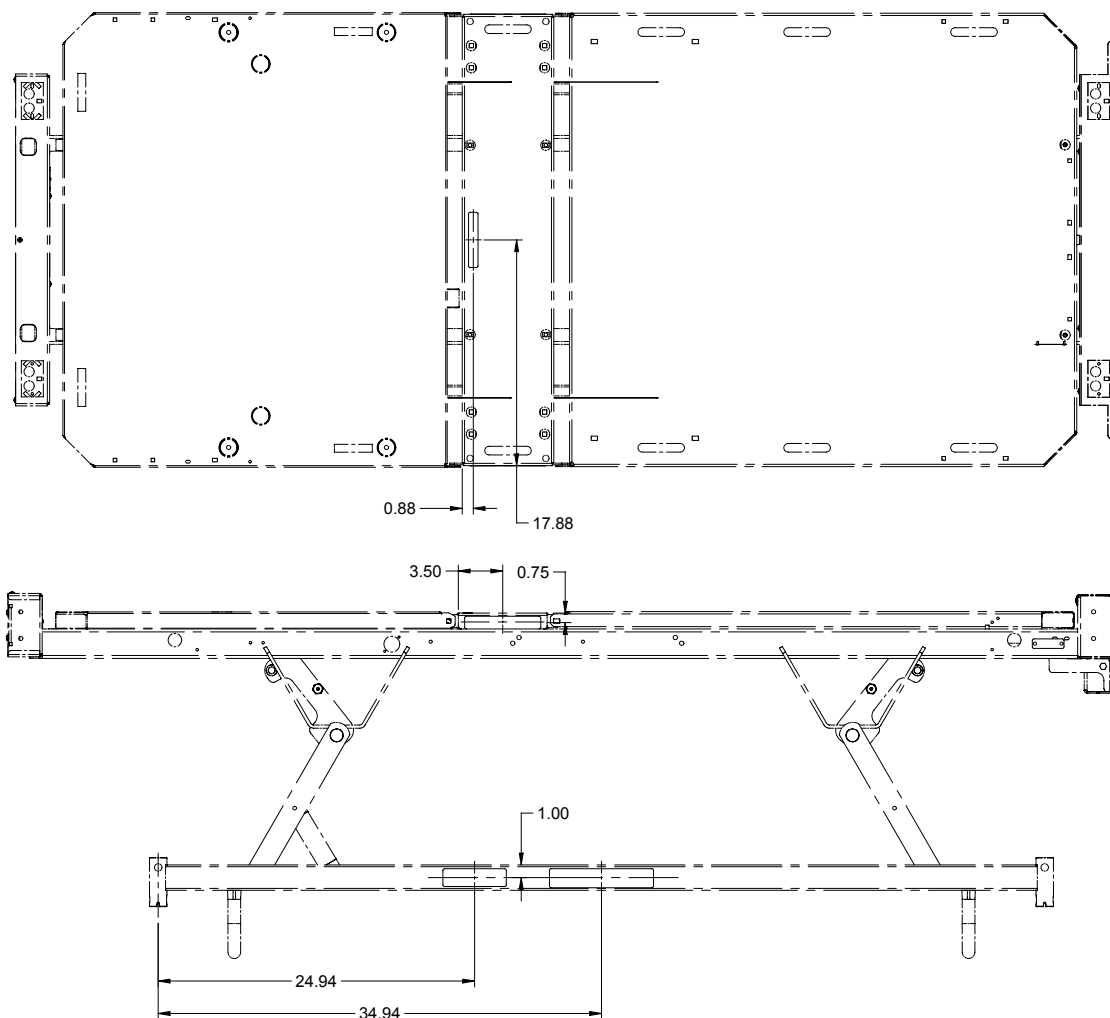


Autocollants français/anglais (Référence seulement : OL230293, Rév. 00)


Item	Numéro de pièce	Description	Quantité
1	QE71-0346	Autocollant - Stryker	2
2	QE71-0547	Autocollant - Charge maximale	2
3	QE71-0739-T	Autocollant - Positions des pédales droit	1
4	QE71-0740-T	Autocollant - Positions des pédales gauche	1
5	QE71-0741-T	Autocollant - Épaisseur maximum du matelas	1
6	QE71-1241	Autocollant - Mouvement du sommier de tête	1
7	QE71-1243	Autocollant - Mouvement vertical du lit	1
8	QE71-1245-T	Plaque numéro de série	1
9	VR11H43	Rivet «POP» diamètre 1-8 long 0.220 tête dôme	2

Côté de lit pleine longueur rétractable sans contrôle


Référence seulement : OL230280
Rév. 01

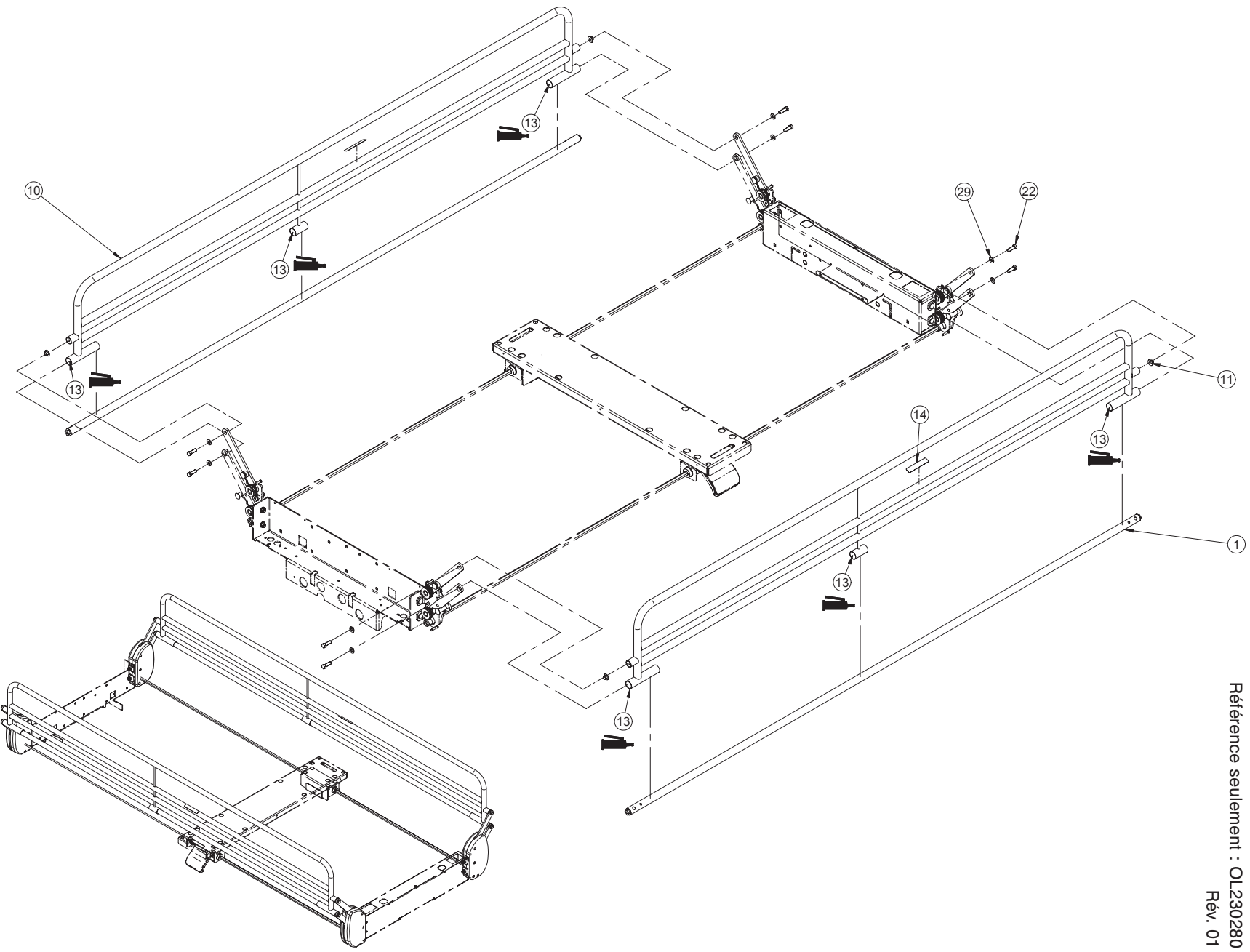

Retour à la table des matières

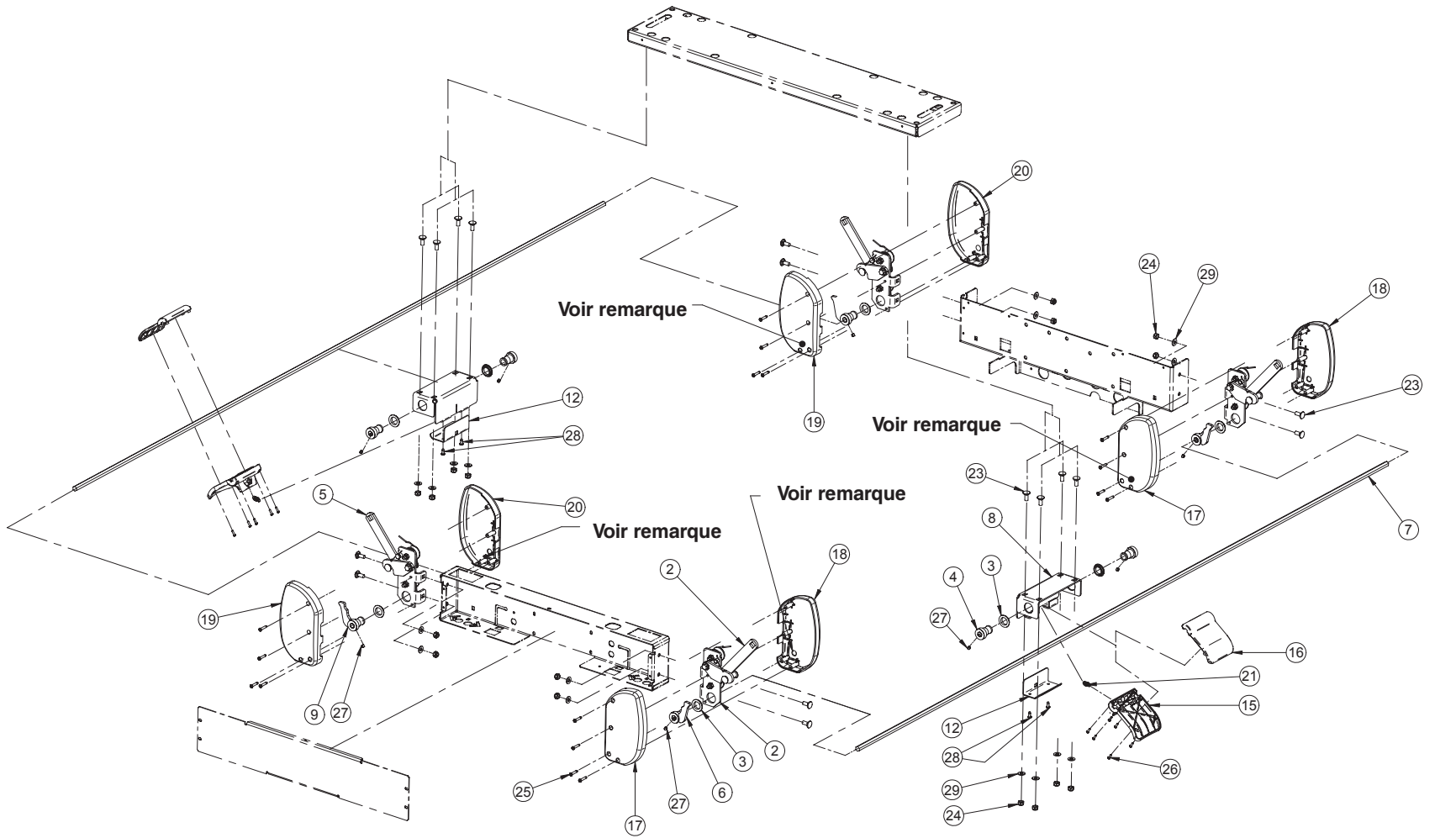

Remarque
 Briser le bouchon dans le couvercle.

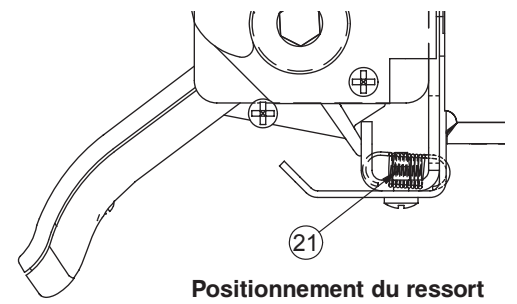

Positionnement du ressort

Côté de lit pleine longueur rétractable sans contrôle

Côté de lit pleine longueur rétractable sans contrôle (Référence seulement : OL230280CG, Rév. 01)

Item	Numéro de pièce	Description	Quantité
1	23-0492C	S.A. Tube de pivot	2
2	23-0535	S.A. Mécanisme de côté de lit droit	2
3	23-0541	Entretoise à épaulement	8
4	23-0547Z	Douille de blocage	4
5	23-0548	S.A. Mécanisme de côté de lit gauche	2
6	23-0549Z	S.A. Doigt de désengagement droit	2
7	23-0550Z	Tige de désengagement - tête	2
8	23-0551G	Support de poignée de côté de lit	2
9	23-0555Z	S.A. Doigt de désengagement gauche	2
10	23-0654C	S.A. Côté de lit pleine longueur sans contrôle	2
11	23-0658	Espaceur de pivot	4
12	23-0848G	Protecteur ressort	2
13	M0019	Graisse grade OG 2	0.0300 kg
14	QE71-1175-T	Étiquette - Manipuler ici	2
15	QP23-0556-08	Poignée désengagement bas	2
16	QP23-0557-08	Poignée désengagement haut	2
17	QP23-0623-07	Recouvrement du mécanisme gauche - trou bouché	2
18	QP23-0624-07	Recouvrement mécanique droit - trou bouché	2
19	QP23-0625-07	Recouvrement mécanique gauche - trou bouché	2
20	QP23-0626-07	Recouvrement mécanique droite - trou bouché	2
21	QRE23-0561	Ressort extension poignée	2
22	VB15A1O32-S	Boulon 5/16"-18 x 1" LG grade 5 Scotch Grip	8
23	VB35A1O24	Boulon de carrosserie 5/16-18 x 3/4" grade 5 p.z.	16
24	VE30A1O	Écrou à blocage nylon 5/16"-18	16
25	VV23A1G32HL	Vis taraudeuse type High-Low tête pan Phillips #10 x 1" p.z.	16
26	VV23A9C16HL	Vis type Hi-Low B pan Phillips #6 x 1/2	12
27	VV61A0M08	Vis pression 6 pans creux 1/4-28 x 1/4 nylon	8
28	VV83A9G16	Vis taraudeuse type B tête pan Phillips #10 x 1/2" p.z.	4
29	VW10A10	Rondelle plate diamètre 5/16" S.A.E.	24

[Retour à la table des matières](#)

Côté de lit pleine longueur rétractable sans contrôle


Côté de lit pleine longueur rétractable sans contrôle (Référence seulement : OL230280CG-T, Rév. 01) (option antivol)

Item	Numéro de pièce	Description	Quantité
1	23-0492C	S.A. Tube de pivot	2
2	23-0535	S.A. Mécanisme de côté de lit droit	2
3	23-0541	Entretoise à épaulement	8
4	23-0547Z	Douille de blocage	4
5	23-0548	S.A. Mécanisme de côté de lit gauche	2
6	23-0549Z	S.A. Doigt de désengagement droit	2
7	23-0550Z	Tige de désengagement - tête	2
8	23-0551G	Support de poignée de côté de lit	2
9	23-0555Z	S.A. Doigt de désengagement gauche	2
10	23-0654C	S.A. Côté de lit pleine longueur sans contrôle	2
11	23-0658	Espaceur de pivot	4
12	23-0848G	Protecteur ressort	2
13	M0019	Graisse grade OG 2	0.0300 kg
14	QE71-1175-T	Étiquette - Manipuler ici	2
15	QP23-0556-08	Poignée désengagement bas	2
16	QP23-0557-08	Poignée désengagement haut	2
17	QP23-0623-07	Recouvrement du mécanisme gauche - trou bouché	2
18	QP23-0624-07	Recouvrement mécanique droit - trou bouché	2
19	QP23-0625-07	Recouvrement mécanique gauche - trou bouché	2
20	QP23-0626-07	Recouvrement mécanique droite - trou bouché	2
21	QRE23-0561	Ressort extension poignée	2
22	VVB3A1O32-S	Vis mécanique tête pan torx 5/16"-18 x 1" grade 5 Scotch Grip	8
23	VB35A1O24	Boulon de carrosserie 5/16-18 x 3/4" grade 5 p.z.	16
24	VE30A1O	Écrou à blocage nylon 5/16"-18	16
25	VV23A1G32HL	Vis taraudeuse type High-Low tête pan Phillips #10 x 1" p.z.	16
26	VVB3A9C16HL	Vis type Hi-Low B pan torx #6 x 1/2	12
27	VV61A0M08	Vis pression 6 pans creux 1/4-28 x 1/4 nylon	8
28	VVB3A0G16	Vis taraudeuse type B tête pan torx #10 x 1/2" p.z.	4
29	VW10A10	Rondelle plate diamètre 5/16" S.A.E.	24

Côté de lit mi-longueur rétractable


Référence seulement : OL230259

Rév. 01

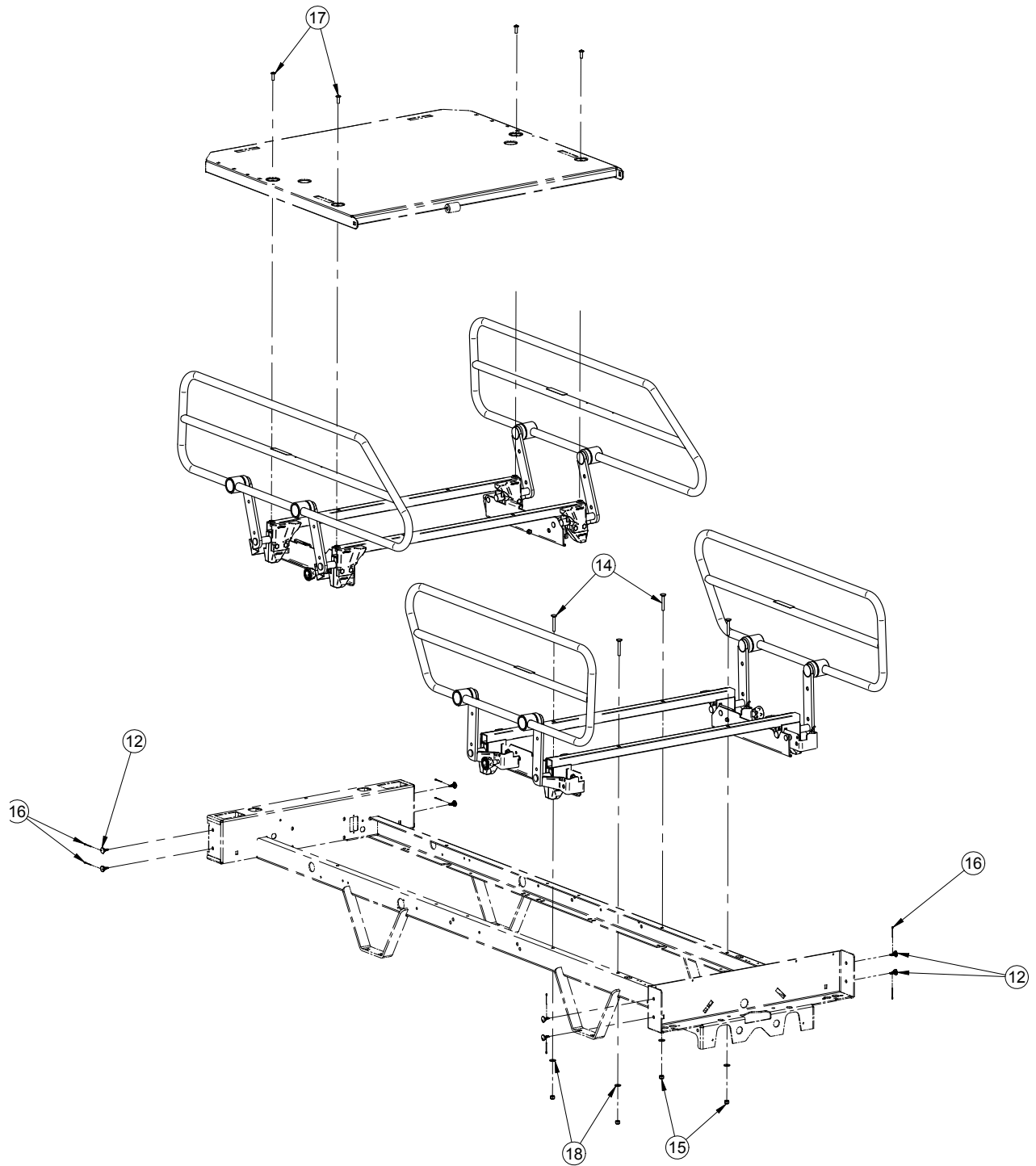

[Retour à la table des matières](#)

Côté de lit mi-longueur rétractable

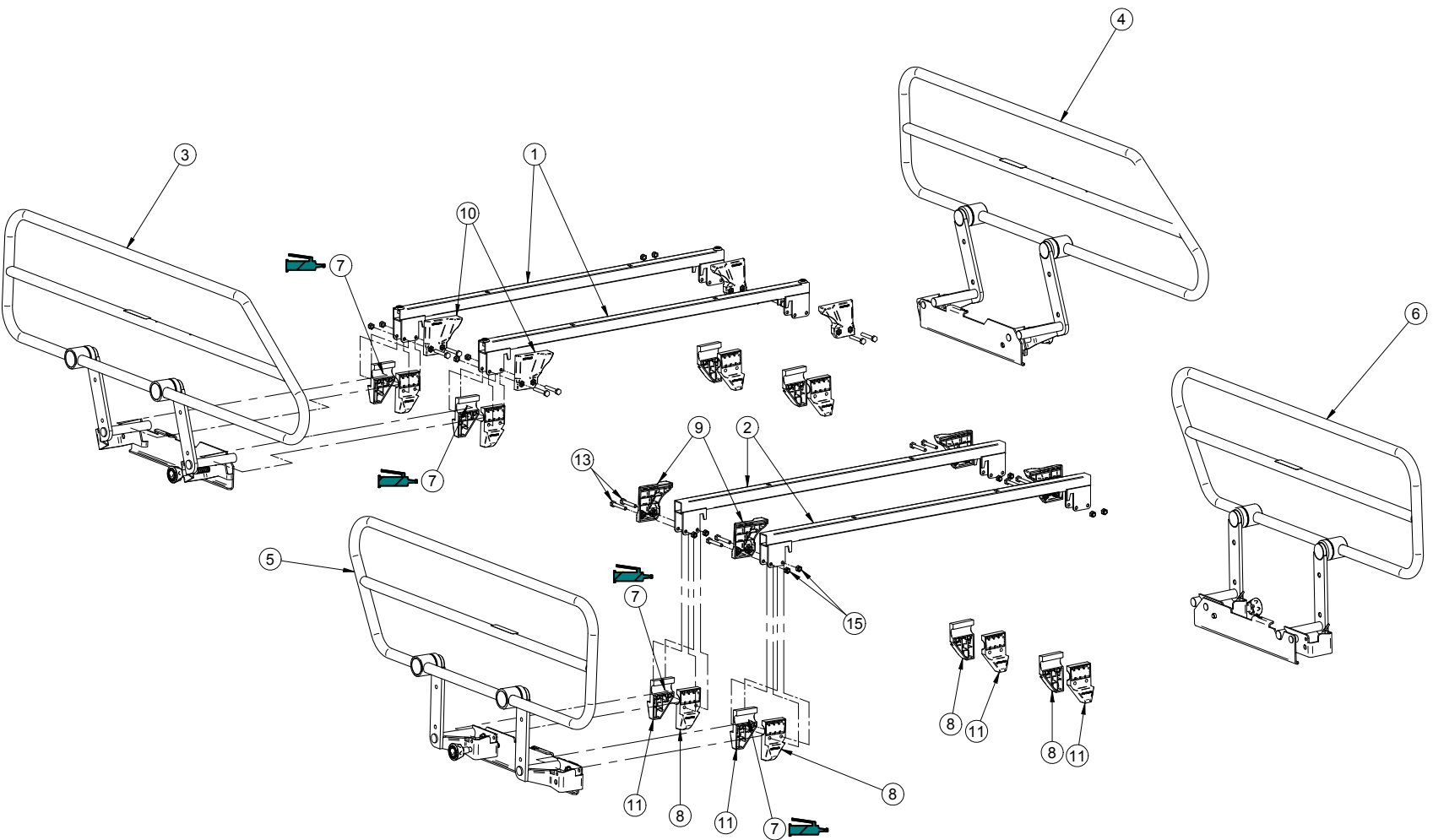

Côté de lit mi-longueur rétractable

Côté de lit mi-longueur rétractable (Référence seulement : OL230259CG, Rév. 01)

Item	Numéro de pièce	Description	Quantité
1	23-0188	Support côté sûreté et insertion	2
2	23-0650G	S.A. Support de côté de sûreté	2
3	23-0832	S.A. Côté de lit tête droit	1
4	23-0833	S.A. Côté de lit tête gauche	1
5	23-0834	S.A. Côté sûreté - pied droit	1
6	23-0835	S.A. Côté de sûreté - pied gauche	1
7	M0019	Graisse grade OG 2	1
8	QP18-0240-07	Ancrage - glisseur gauche	8
9	QP18-0241-07	Glisseur arrière droit	4
10	QP18-0242-07	Glisseur arrière gauche	4
11	QP18-0243-07	Ancrage glisseur droit	8
12	QP23-0735	Support de PCB	8
13	VB15A1N44	Boulon 1/4"-20 x 1 3/4" LG grade 5	16
14	VB35A1N44	Boulon de carrosserie 1/4-20 x 1 3/4" grade 5	4
15	VE30A1N	Écrou à blocage nylon 1/4-20	20
16	VG40B0240	Goupille fendue 1/16" x 1 1/2" LG	8
17	VV37A1N24-S	Vis mécanique «Truss» Phillips 1/4-20 x 3/4" Scotch Grip	4
18	VW10A08	Rondelle plate 1/4 x 1/16	4

Côté de lit mi-longueur rétractable (Référence seulement : OL230259CG-T, Rév. 01) (option antivol)


Item	Numéro de pièce	Description	Quantité
1	23-0188	Support côté sûreté et insertion	2
2	23-0650G	S.A. Support de côté de sûreté	2
3	23-0832	S.A. Côté de lit tête droit	1
4	23-0833	S.A. Côté de lit tête gauche	1
5	23-0834	S.A. Côté sûreté - pied droit	1
6	23-0835	S.A. Côté de sûreté - pied gauche	1
7	M0019	Graisse grade OG 2	1
8	QP18-0240-07	Ancrage - glisseur gauche	8
9	QP18-0241-07	Glisseur arrière droit	4
10	QP18-0242-07	Glisseur arrière gauche	4
11	QP18-0243-07	Ancrage glisseur droit	8
12	QP23-0735	Support de PCB	8
13	VB15A1N44	Boulon 1/4"-20 x 1 3/4" LG grade 5	16
14	VB35A1N44	Boulon de carrosserie 1/4-20 x 1 3/4" grade 5	4
15	VE52A1N	Écrou antivol 1/4-20	20
16	VG40B0240	Goupille fendue 1/16" x 1 1/2" LG	8
17	VVB7A1N24-S	Vis mécanique «Truss» torx 1/4-20 x 3/4" Scotch Grip	4
18	VW10A08	Rondelle plate 1/4 x 1/16	4

Notes

Côté de lit mi-longueur tête seulement


Référence seulement : OL230260

Rév. 02

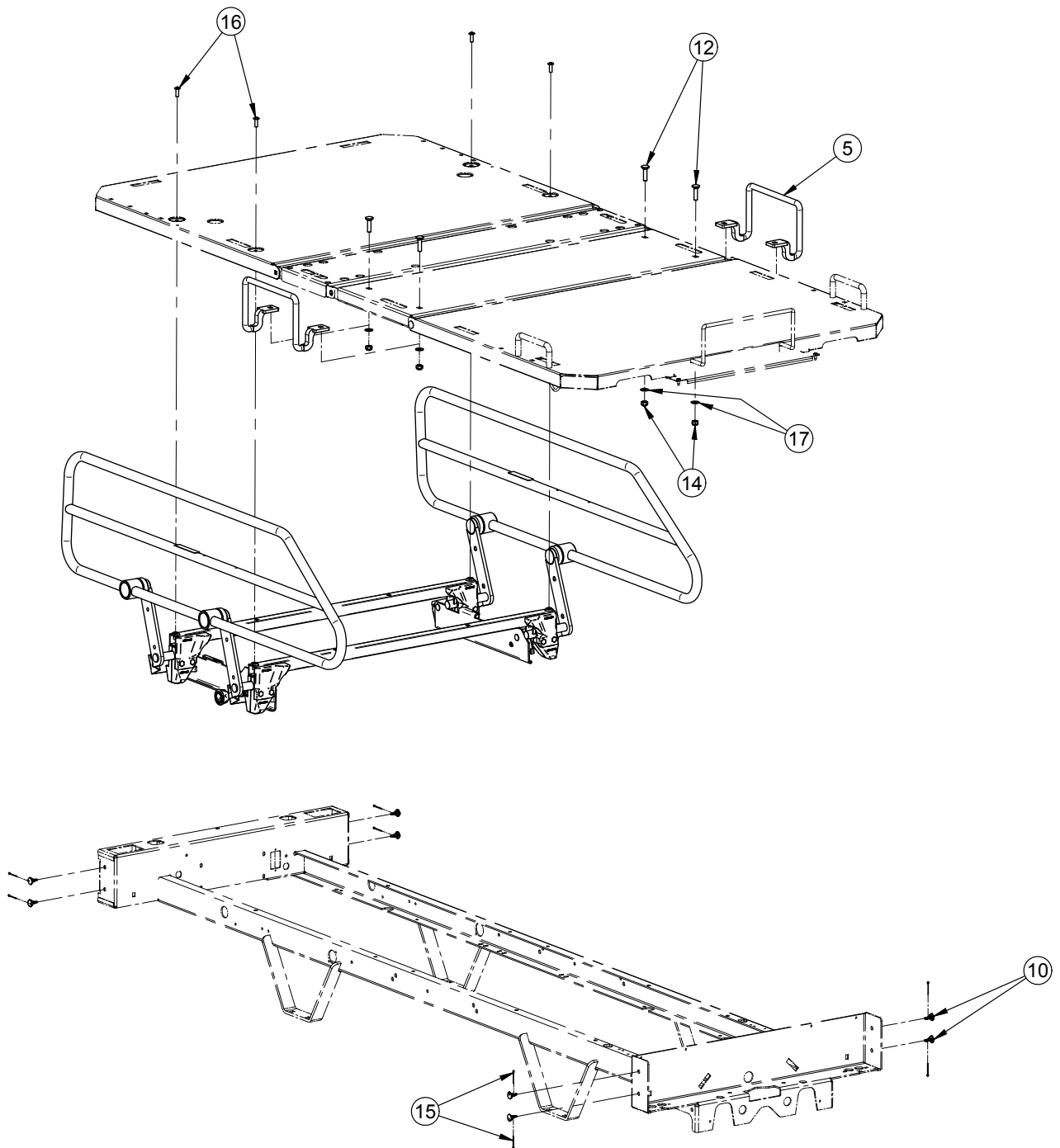

[Retour à la table des matières](#)

Côté de lit mi-longueur tête seulement

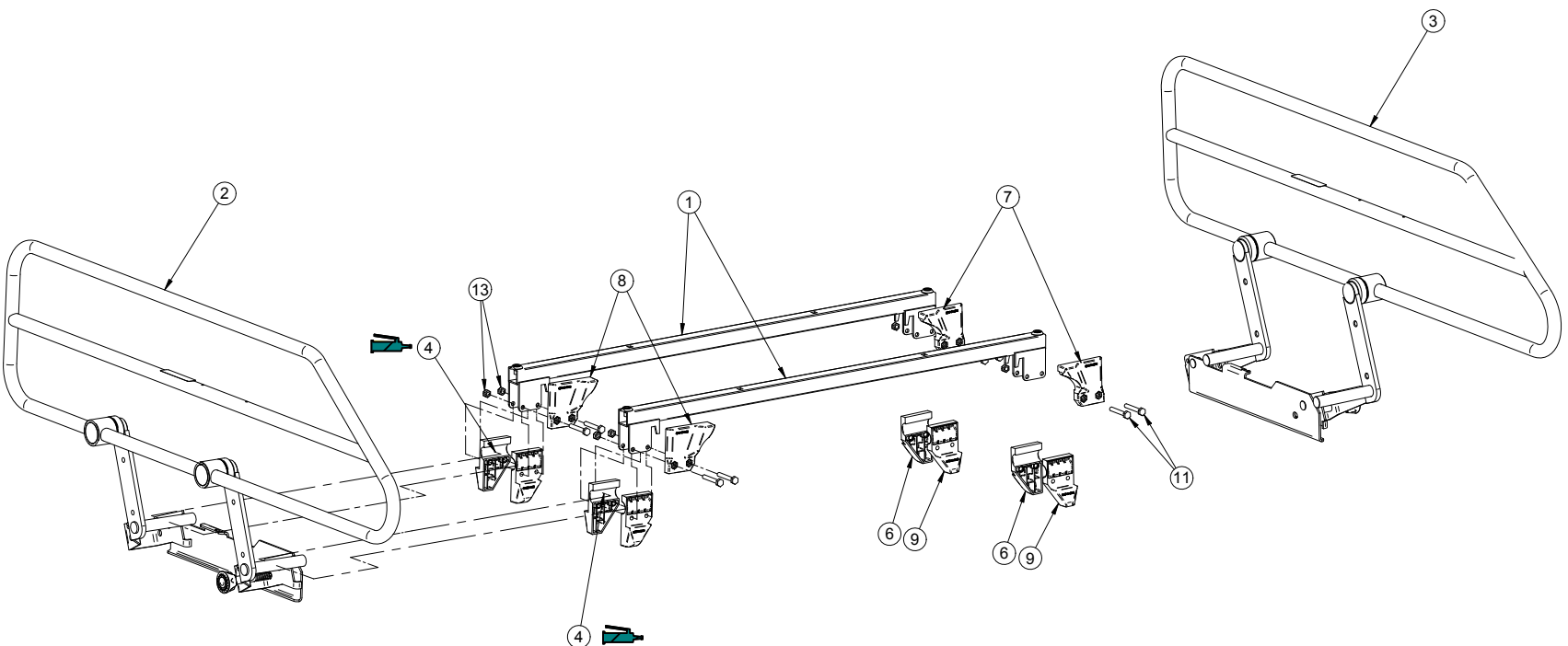

Côté de lit mi-longueur tête seulement

Côté de lit mi-longueur tête seulement (Référence seulement : OL230260CG, Rév. 01)

Item	Numéro de pièce	Description	Quantité
1	23-0188	Support côté sûreté et insertion	2
2	23-0832	S.A. Côté de lit tête droit	1
3	23-0833	S.A. Côté de lit tête gauche	1
4	M0019	Graisse grade OG 2	1
5	QDF23-0830C	Réducteur d'espace	2
6	QP18-0240-07	Ancrage - glisseur gauche	4
7	QP18-0241-07	Glisseur arrière droit	2
8	QP18-0242-07	Glisseur arrière gauche	2
9	QP18-0243-07	Ancrage glisseur droit	4
10	QP23-0735	Support de PCB	8
11	VB15A1N44	Boulon 1/4"-20 x 1 3/4" LG grade 5	8
12	VB35A1O36	Boulon carrosserie 5/16-18 x 1.25" grade 5 p.z.	4
13	VE30A1N	Écrou à blocage nylon 1/4-20	8
14	VE30A1O	Écrou à blocage nylon 5/16"-18	4
15	VG40B0240	Goupille fendue 1/16" x 1 1/2" LG	8
16	VV37A1N24-S	Vis mécanique «Truss» Phillips 1/4-20 x 3/4" Scotch Grip	4
17	VW10A10	Rondelle plate diamètre 5/16" S.A.E	4

Côté de lit mi-longueur tête seulement (Référence seulement : OL230260CG-T, Rév. 00) (option antivol)

Item	Numéro de pièce	Description	Quantité
1	23-0188	Support côté sûreté et insertion	2
2	23-0832	S.A. Côté de lit tête droit	1
3	23-0833	S.A. Côté de lit tête gauche	1
4	M0019	Graisse grade OG 2	1
5	QDF23-0830C	Réducteur d'espace	2
6	QP18-0240-07	Ancrage - glisseur gauche	4
7	QP18-0241-07	Glisseur arrière droit	2
8	QP18-0242-07	Glisseur arrière gauche	2
9	QP18-0243-07	Ancrage glisseur droit	4
10	QP23-0735	Support de PCB	8
11	VVB3A1N44-S	Vis mécanique tête pan torx 1/4"-20 x 1 3/4" LG grade 5	8
12	VB35A1O36	Boulon carrosserie 5/16-18 x 1.25" grade 5 p.z.	4
13	VE52A1N	Écrou antivol 1/4-20	8
14	VE52A1O	Écrou antivol 5/16"-18	4
15	VG40B0240	Goupille fendue 1/16" x 1 1/2" LG	8
16	VVB7A1N24-S	Vis mécanique «Truss» Phillips 1/4-20 x 3/4" Scotch Grip	4
17	VW10A10	Rondelle plate diamètre 5/16" S.A.E.	4


[Retour à la table des matières](#)

Notes

Panneau de mélamine

Référence seulement : OP230194

Rév. 02

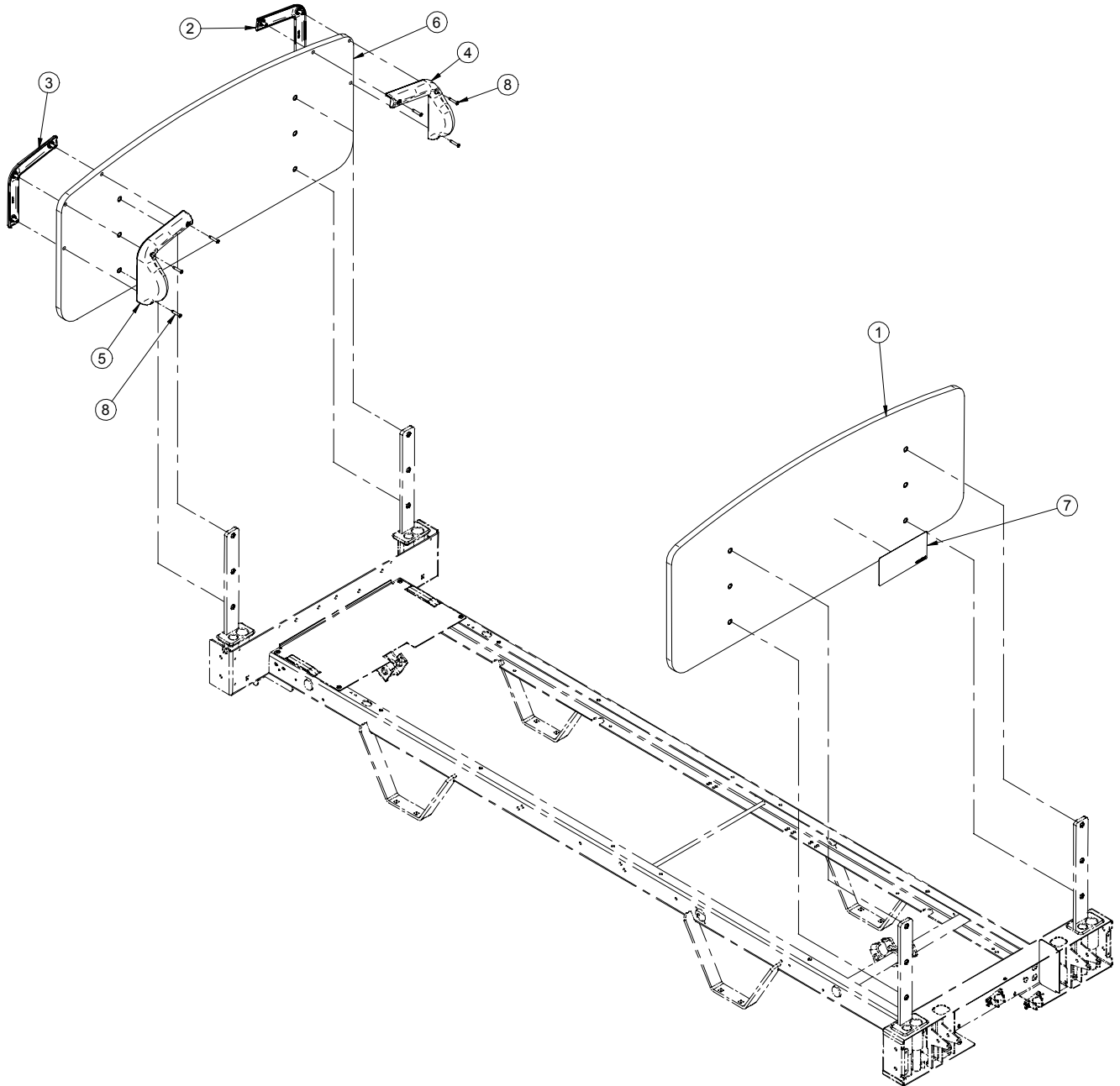

[Retour à la table des matières](#)

Panneau de mélamine


Panneau mélamine (Référence seulement : OP230194, Rév. 02)

Item	Numéro de pièce	Description	Quantité
1	23-0218	Panneau de pied mélamine	1
2	QP23-0472-07	Poignée extérieure droite	1
3	QP23-0473-07	Poignée extérieure gauche	1
4	QP23-0474-07	Poignée intérieure droite	1
5	QP23-0475-07	Poignée intérieure gauche	1
6	23-0514	Panneau de pied en mélamine	1
7	QE14376-T	Autocollant - Inversion	1
8	VV23A1G32HL	Vis taraudeuse pan Phillips type High-Low #10 x 1" p.z.	6

Panneau MDF stratifié

Référence seulement : OP230195

Rév. 02

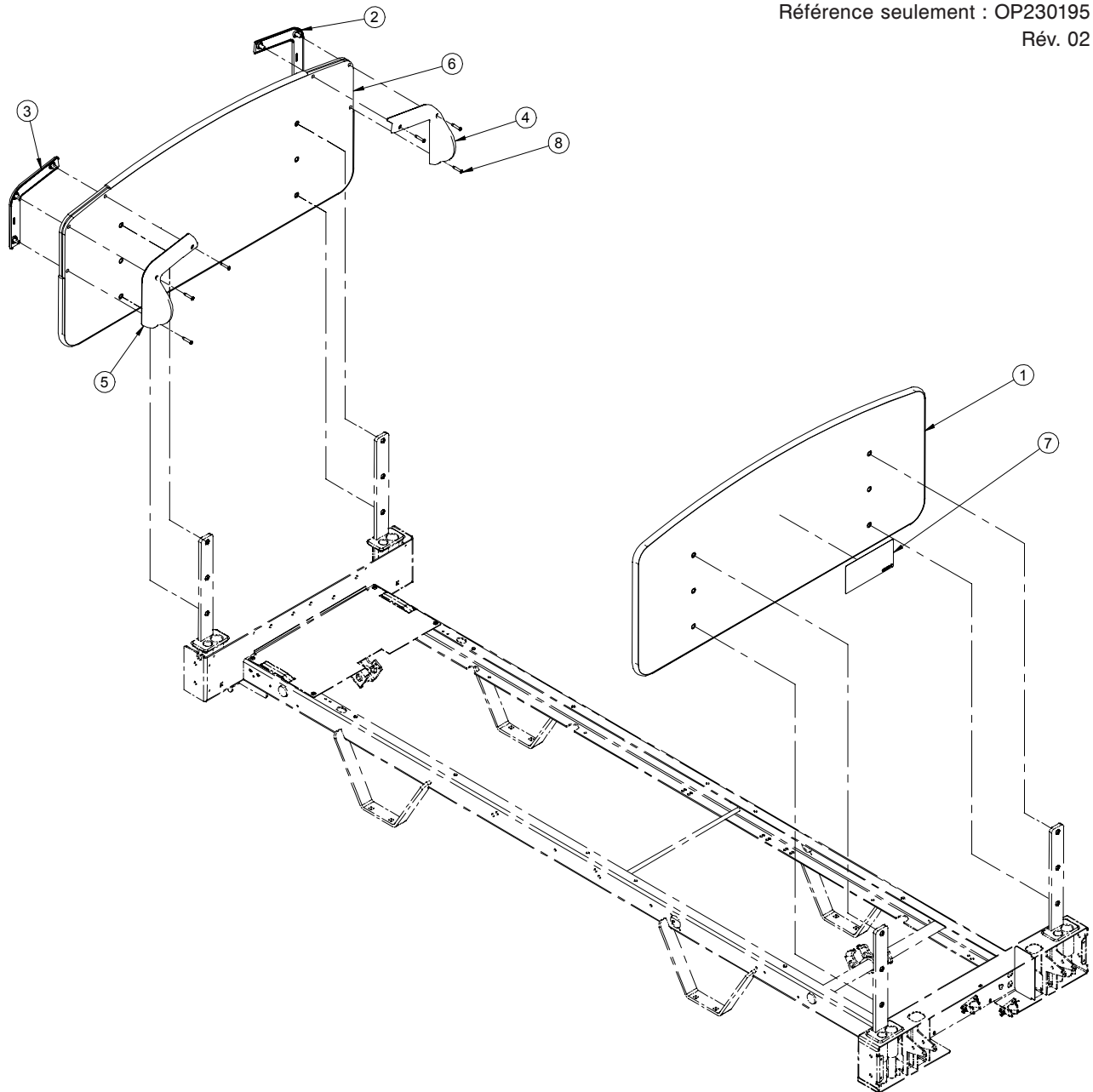

[Retour à la table des matières](#)

Panneau MDF stratifié


Panneau MDF stratifié (Référence seulement : OP230195, Rév. 02)

Item	Numéro de pièce	Description	Quantité
1	23-0122	Panneau MDF stratifié	1
2	QP23-0472-07	Poignée extérieure droite	1
3	QP23-0473-07	Poignée extérieure gauche	1
4	QP23-0474-07	Poignée intérieure droite	1
5	QP23-0475-07	Poignée intérieure gauche	1
6	23-0516	Panneau stratifié	1
7	QE14376-T	Autocollant - Inversion	1
8	VV23A1G32HL	Vis taraudeuse tête pan Phillips type High-Low #10 x 1" p.z.	6

Panneaux massifs

Référence seulement : OP230214

Rév. 02

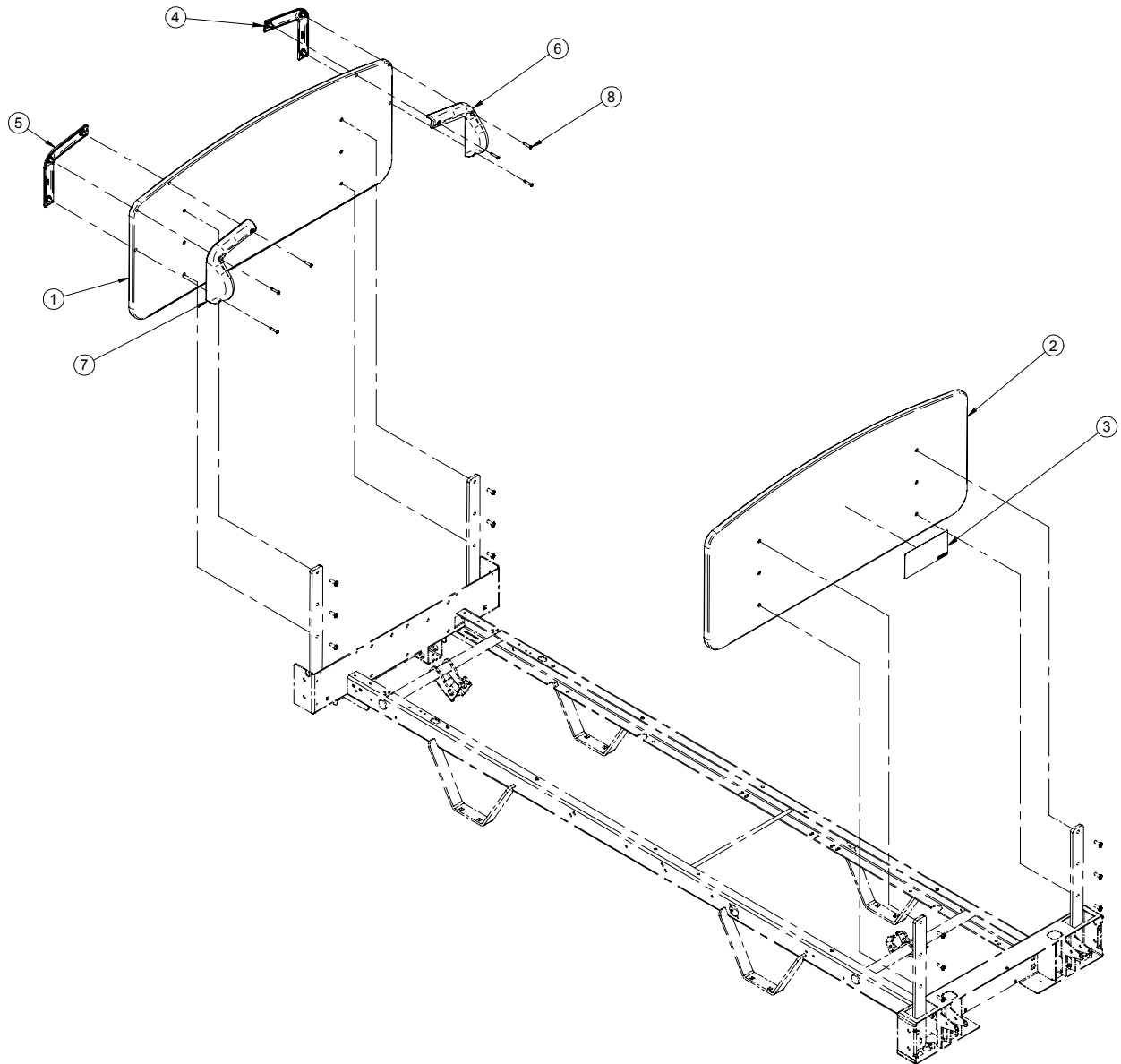

[Retour à la table des matières](#)

Panneaux massifs


Panneau massif (Référence seulement : OP230214, Rév. 02)

Item	Numéro de pièce	Description	Quantité
1	23-0660	S.A. Panneau de pied massif	1
2	23-0634	S.A. Panneau de tête en massif	1
3	QE14376-T	Autocollant - Inversion	1
4	QP23-0472-07	Poignée extérieure droite	1
5	QP23-0473-07	Poignée extérieure gauche	1
6	QP23-0474-07	Poignée intérieure droite	1
7	QP23-0475-07	Poignée intérieure gauche	1
8	VV23A1G32HL	Vis taraudeuse tête pan Phillips type High-Low #10 x 1" p.z.	6

Ensemble de poteaux

Référence seulement : L23-032

Rév. 00

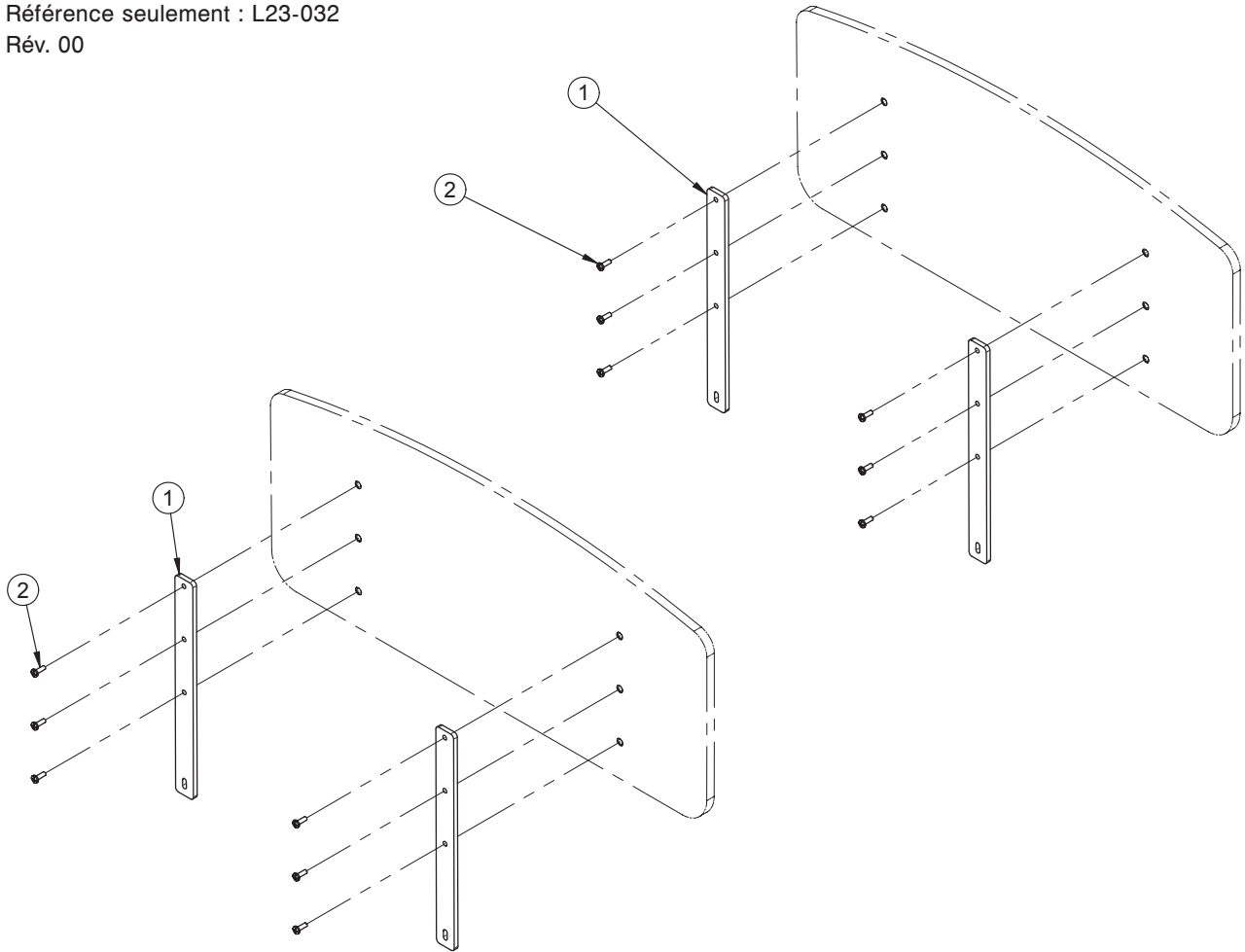

Ensemble de poteaux (Référence seulement : L23-032G, Rév. 00)

Item	Numéro de pièce	Description	Quantité
1	23-0124G	Plaque d'attache	4
2	VV33A1N24-S	Vis mécanique tête pan Phillips 1/4-20 x 3/4" Scotch Grip	12

Ensemble de poteaux (Référence seulement : L23-032G-T, Rév. 00) (option antivol)

Item	Numéro de pièce	Description	Quantité
1	23-0124G	Plaque d'attache	4
2	VVB7A1N24-S	Vis mécanique tête pan torx 1/4-20 x 3/4" Scotch Grip	12

[Retour à la table des matières](#)


Notes

Vis de blocage de panneau


Référence seulement : OL230165

Rév. 03

TÊTE

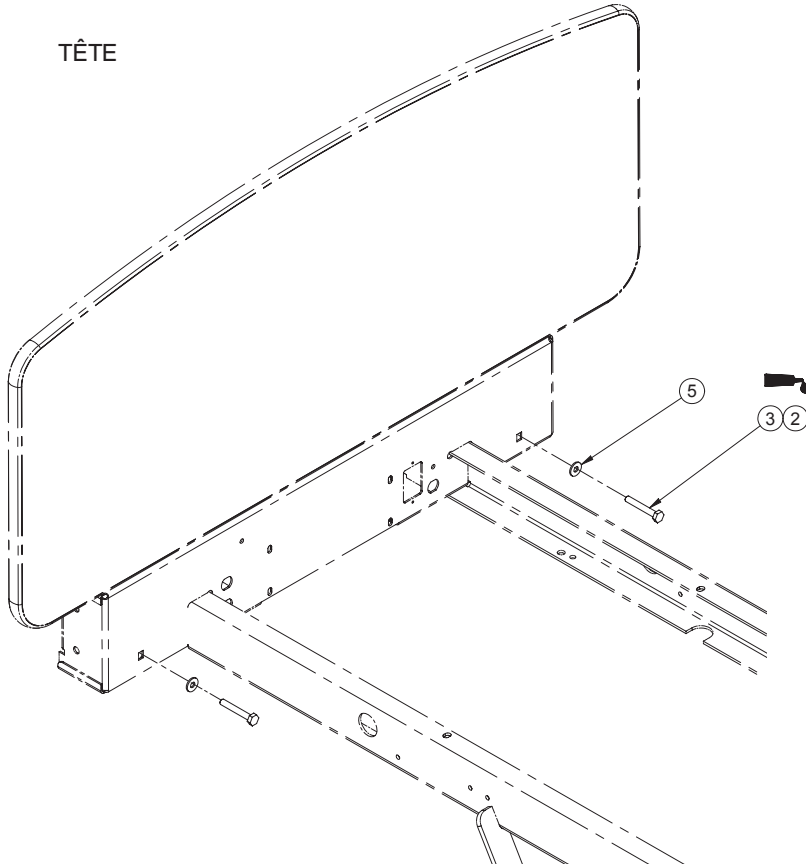

PIED

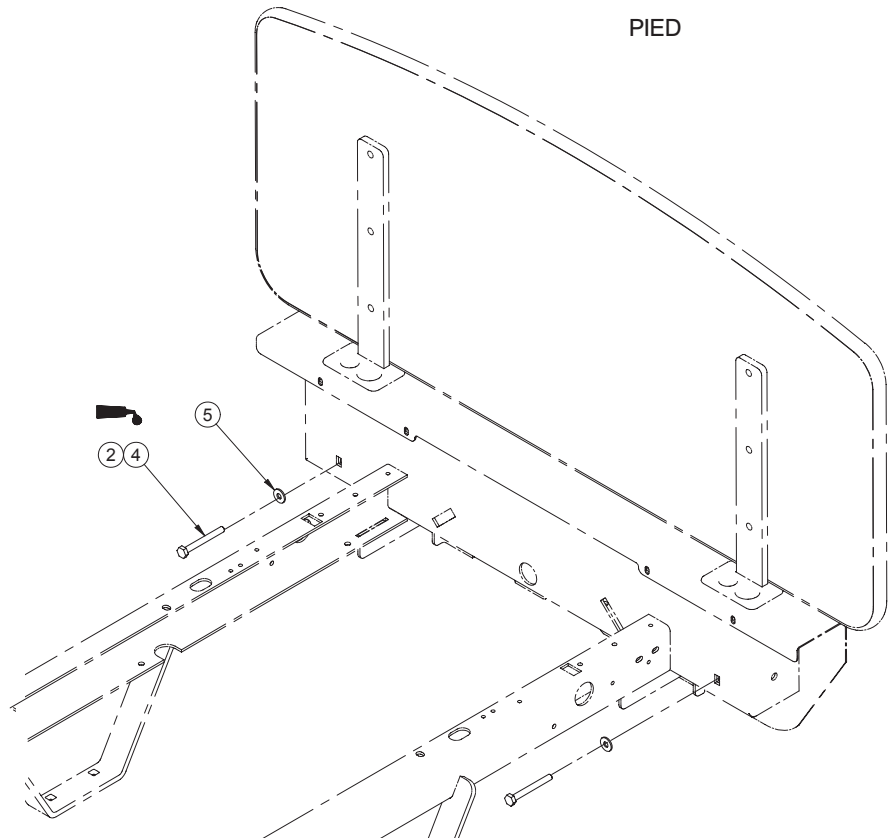

[Retour à la table des matières](#)

Vis de blocage de panneau

Vis de blocage de panneau (Référence seulement : OL230165, Rév. 03)

Item	Numéro de pièce	Description	Quantité
1	ED2043	Sac de plastique refermable 3 x 5	1
2	M0028	Bouteille de 0.5 ml de ciment à filets «Locktite»	1
3	VB15A1N44	Boulon 1/4" 20 x 1 3/4", grade 5	2
4	VB15A1N50	Boulon hexagone 1/4-20 x 2 1/4" grade 5 p.z.	2
5	VW10A08	Rondelle plate 1/4" x 1/16"	4

Vis de blocage de panneau (Référence seulement : OL230165-T, Rév. 03) (option antivol)

Item	Numéro de pièce	Description	Quantité
1	ED2043	Sac de plastique refermable 3 x 5	1
2	M0028	Bouteille de 0.5 ml de ciment à filets «Locktite»	1
3	VVB3A1N44-S	Vis mécanique tête pan torx 1/4" 20 x 1 3/4", grade 5	2
4	VVB3A1N50-S	Vis mécanique tête pan torx 1/4-20 x 2 1/4" grade 5 p.z.	2
5	VW10A08	Rondelle plate 1/4" x 1/16"	4


Accessoires optionnels du lit

Accessoire	Numéro de pièce	Référence
Coussins protecteurs pour côtés de lit mi-longueur	DM64232	Voir page 141
Coussins protecteurs pour côtés de lit pleine longueur	DM64176	Voir page 141
Tige porte-soluté amovible de un pouce de diamètre	FA61002-G	Voir page 133
Support à bouteille d'oxygène	FA64036-G	Voir page 137
Support à bouteille d'oxygène vertical	FA64117	Voir page 136
Trapèze	FA64145	Voir page 139
Support de moniteur	FA64153	Voir page 135
Tige porte-soluté fixe de un pouce de diamètre	FA64157	Voir page 134
Tige porte-soluté amovible	FDTSH	Voir page 132

Remarque

Les accessoires sont disponibles pour ce type de lit mais l'utilisation sécuritaire en fonction de l'état psychologique des patients devra être géré par le personnel infirmier et en accordance avec la politique de l'établissement.

Tige porte-soluté amovible (en option) - FDTSH

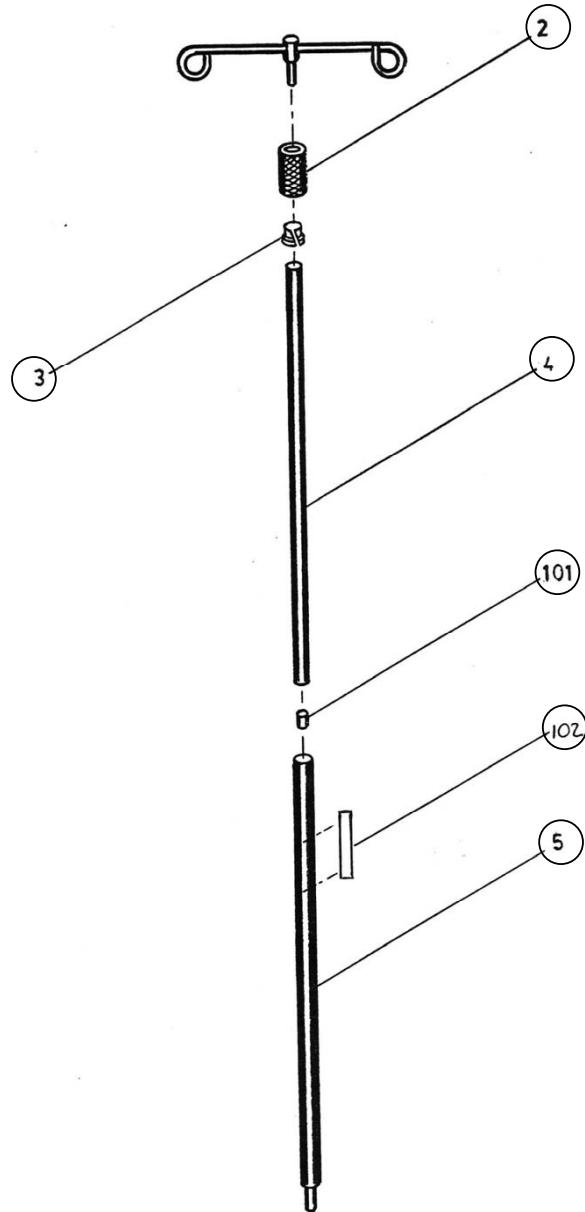


Tige porte-soluté amovible (Référence seulement : FDTSH)

Item	Numéro de pièce	Description	Quantité
2	2111A	Manchon de serrage anodisé	1
3	2109	Douille de compression	1
4	2107A	Tube du haut anodisé	1
5	2105A	Tube du bas anodisé	1
101	QPCE1206	Bouchon de caoutchouc #000 (1/2" x 11/32" x 7/8") noir	1
102	QE71-0246-T	Autocollant - Attention	1

Tige porte-soluté amovible diamètre de un pouce (en option)

- FA61002-G

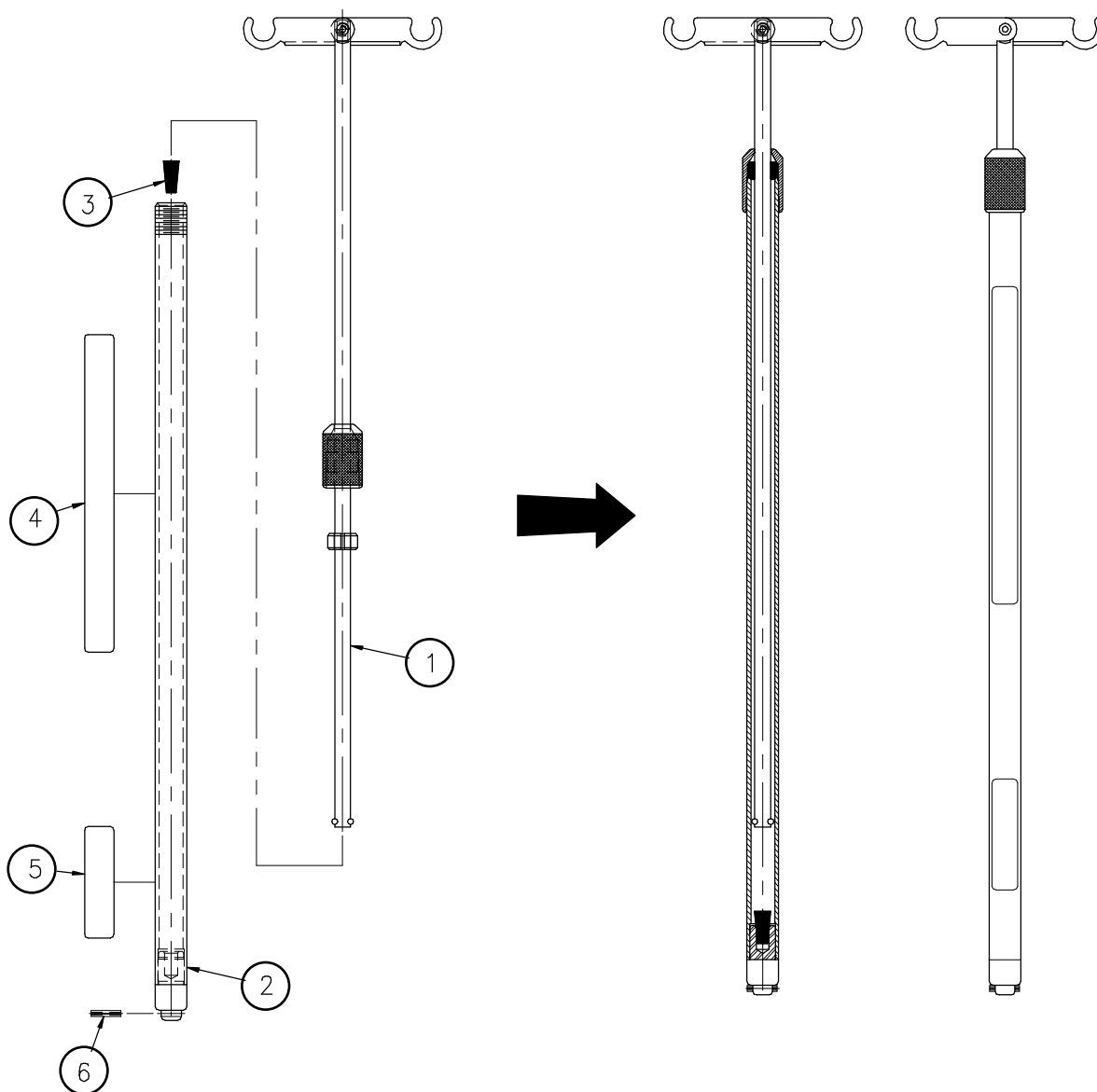


Tige porte-soluté amovible diamètre de un pouce (Référence seulement : FA61002)

Item	Numéro de pièce	Description	Quantité
1	61-0011	S.A. Tige du haut	1
2	61-0002A	S.A. Tube du bas	1
3	QPCE1206	Bouchon de caoutchouc #000 (1/2" x 11/32" x 7/8") noir	1
4	QE71-0246-T	Autocollant - Attention	1
5	QE14399-T	Autocollant manufacturier	1
6	VG10B0630	Goupille ressort 3/16" diamètre x 15/16"	1

Tige porte-soluté fixe diamètre de un pouce (en option)


- FA64157

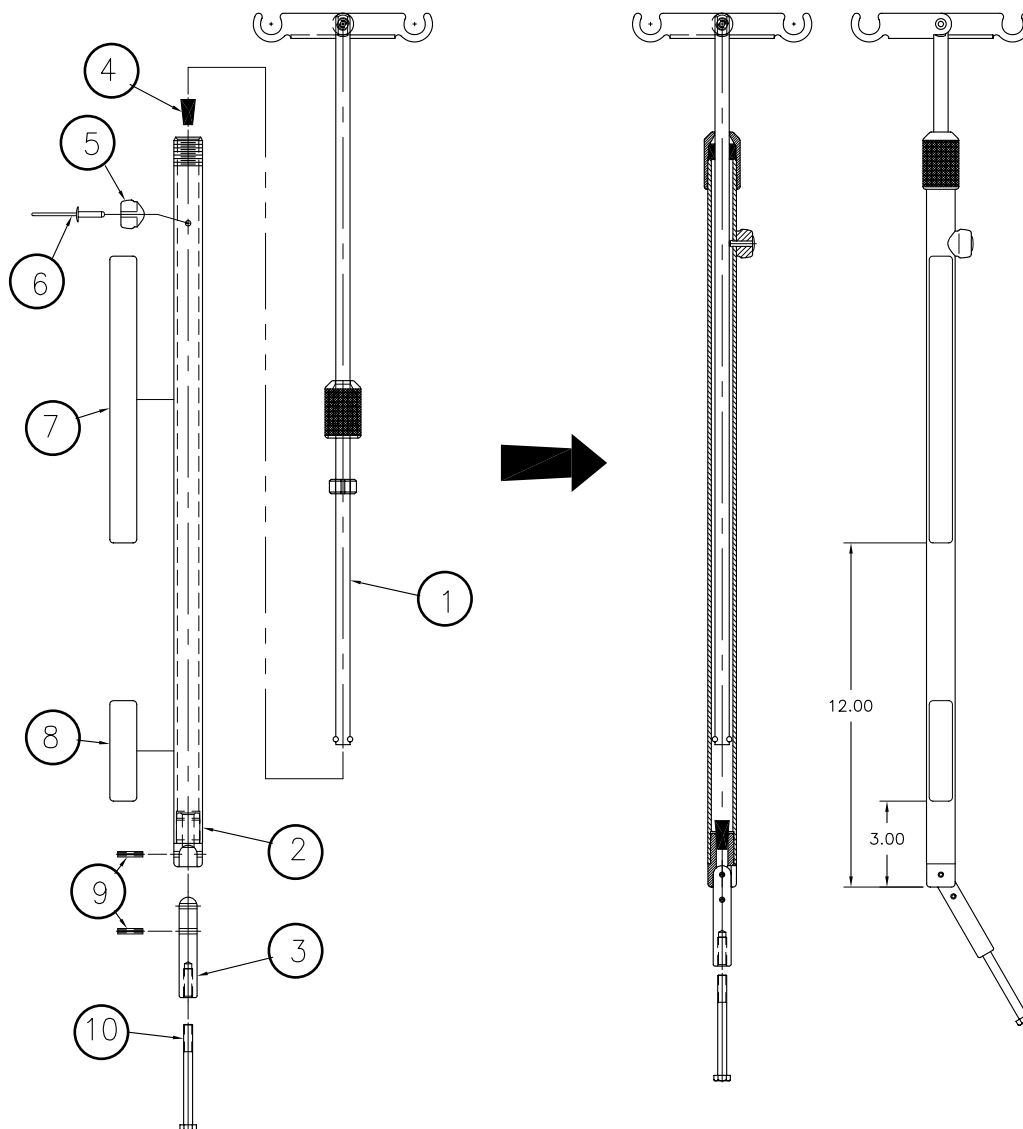

Tige porte-soluté fixe diamètre de un pouce (Référence seulement : FA64157)

Item	Numéro de pièce	Description	Quantité
1	61-0011G	S.A. Tige du haut	1
2	64-0752	S.A. Tube du bas	1
3	61-0012A	Arbre de fixation	1
4	QPCE1206	Bouchon de caoutchouc #000 (1/2" x 11/32" x 7/8") noir	1
5	61-0016A	Butée de tige	1
6	VR15A610	Rivet Pop 3/16" x 0.815" #AD610ABSLF	1
7	QE71-0246-T	Autocollant - Attention	1
8	QE14399-T	Autocollant manufacturier	1
9	VG10B0630	Goupille à ressort 3/16" diamètre x 15/16"	2
10	VB15A1O60	Boulon hexagone 5/16-18 x 3 1/2" grade 5 p.z.	1


Support à moniteur (en option) - FA64153

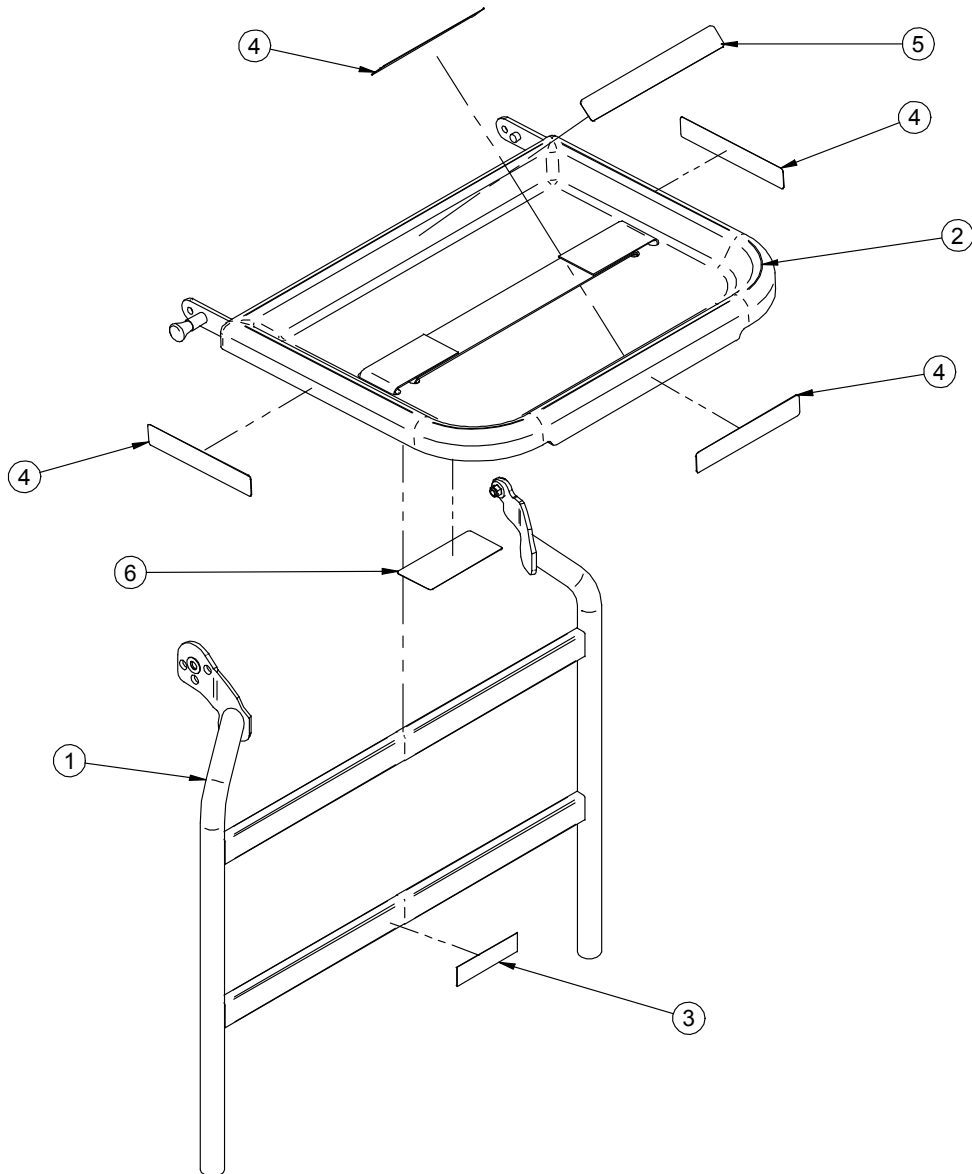

Support à moniteur (Référence seulement : FA64153)

Item	Numéro de pièce	Description	Quantité
1	64-0745G	S.A. Support de tablette	1
2	QDF5093	Tablette et boulonnerie	1
3	QE14399-T	Autocollant manufacturier	1
4	QE71-0578	Autocollant - Charge maximum	4
5	QE71-0579-F	Autocollant - Charge attachée	1
6	QE71-0580-F	Autocollant - Mise en garde	1


Support vertical pour bouteille oxygène (en option) - FA64117

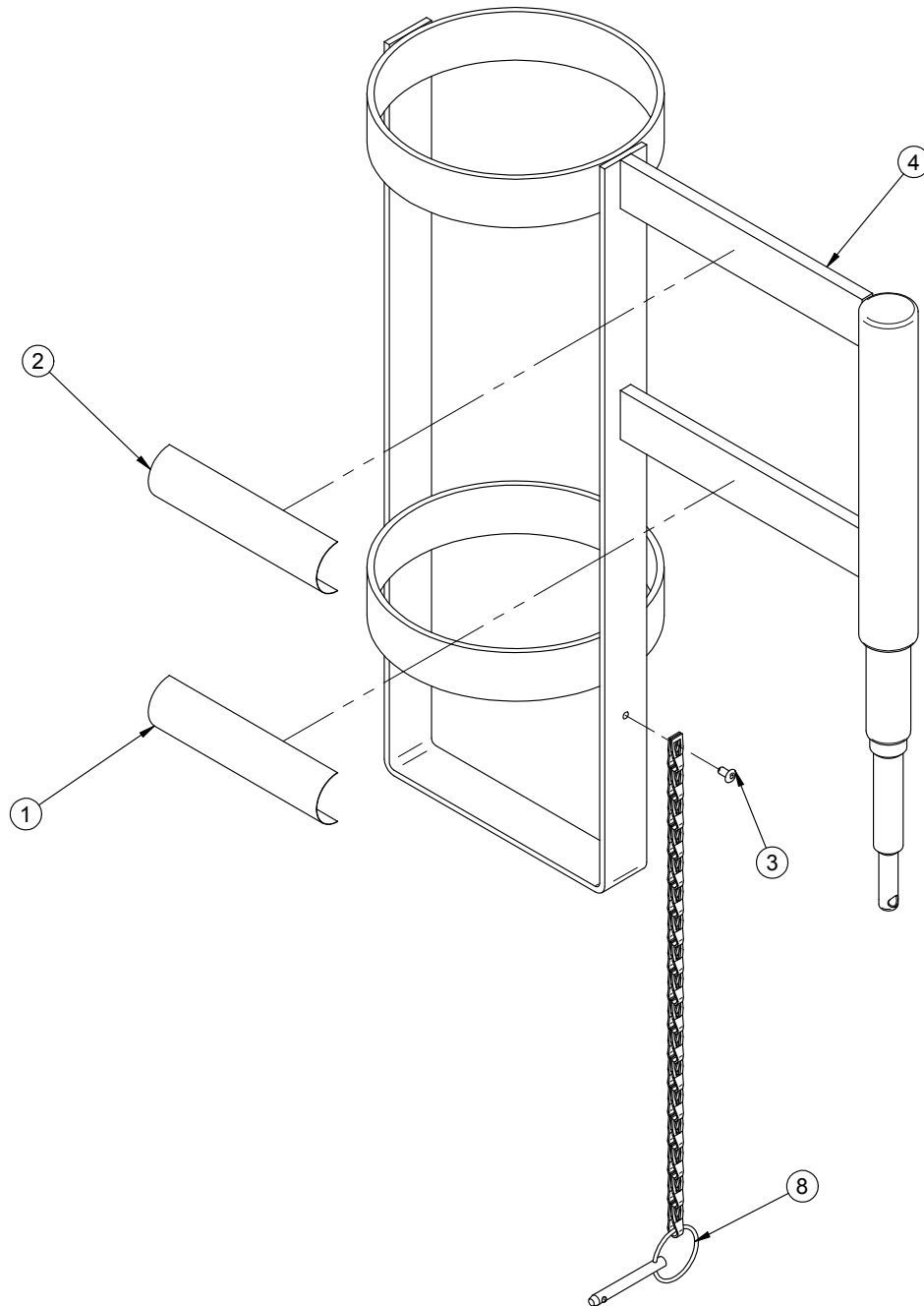

Support vertical pour bouteille oxygène (Référence seulement : FA64117)

Item	Numéro de pièce	Description	Quantité
1	QE14399-T	Autocollant fabricant	1
2	QE71-0601	Autocollant - Charge maximum	1
3	VR11H42	Rivet Pop #42 tête dôme	1
4	QDF64-1005	Support de bouteille d'oxygène	1
8	64-0647	S.A. Chaîne de sécurité	1

Support de bouteille à oxygène (en option) - FA64036-G

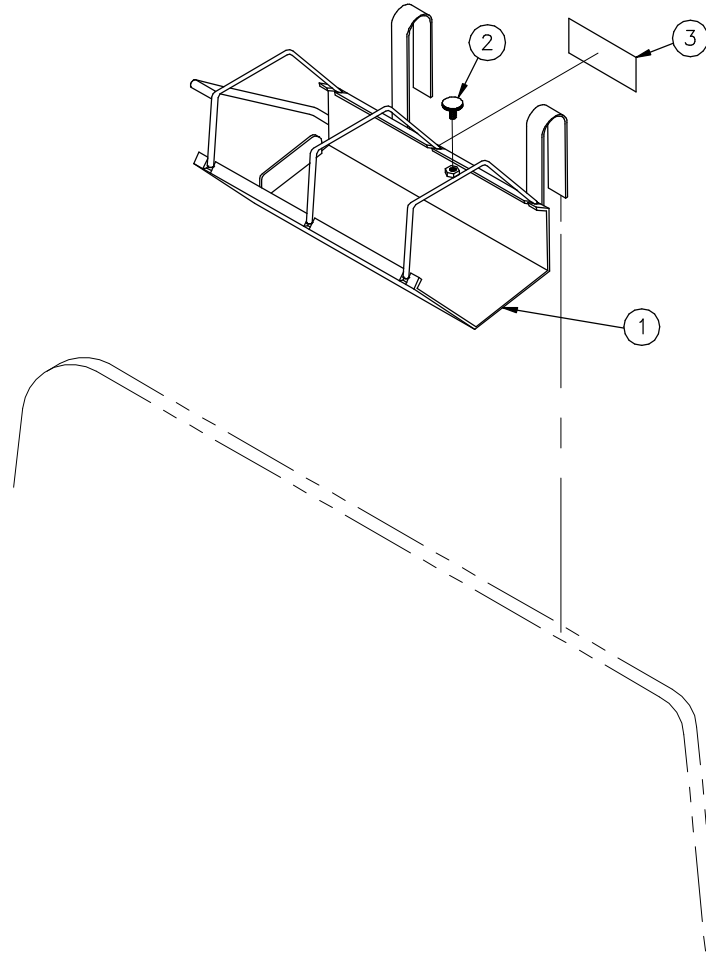


Support de bouteille à oxygène (Référence seulement : FA64036)

Item	Numéro de pièce	Description	Quantité
1	64-0193P	S.A. Support de bouteille à oxygène	1
2	64-0294	S.A. Vis de blocage	1
3	QE14399-T	Autocollant manufacturier	1

Notes

Trapèze (en option) - FA64145

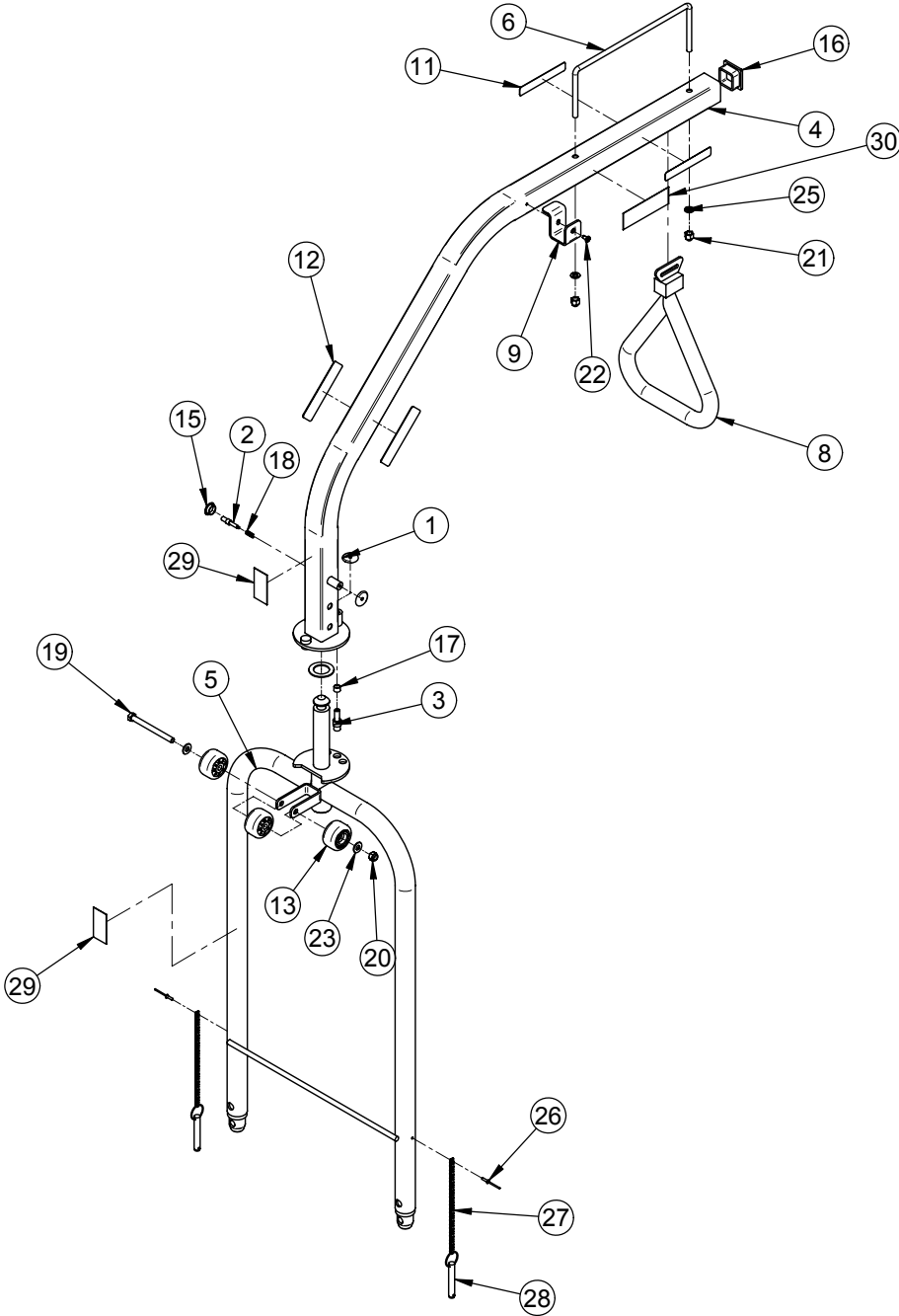


Trapèze (en option) - FA64145

Trapèze (Référence seulement : FA64145)

Item	Numéro de pièce	Description	Quantité
1	16242C	Rondelle du plongeur	2
2	16243Z	Plongeur (bras) plaqué zinc	1
3	18939Z	Plongeur	1
4	64-0700G	Tube supérieur courbé	1
5	64-0699G	S.A. Barre Trapèze	1
6	9870C	Arrêt du triangle	1
8	QDF6023	Poignée triangulaire	1
9	64-1298G	Crochet pour trapèze	1
11	QE71-0292-T	Étiquette poids maximal	2
12	QE71-0731-F	Autocollant «Ne pas utiliser pour entrer et sortir du lit»	2
13	QPC-14-0321	Roulette de pare-chocs diamètre 1 3/4"	3
15	QPPE1205	Bouchon de plastique 5/8" noir	1
16	QPPF1505	Glisseur carré 1 1/2" x 1 1/2"	1
17	QR110027	Ressort compression 0.400" x 0.700 x 0.04"	1
18	QRC9793	Ressort compression 1/4" extérieur x 5/8" x 0.025	1
19	VB15A1O60	Boulon hexagone 5/16-18 x 3 1/2" grade 5 p.z.	1
20	VE30A1O	Écrou hexagone blocage nylon 5/16-18 p.z.	1
21	VE40A1O	Écrou borgne 5/16-18 p.z.	2
22	VV83A9G12	Vis taraudeuse tête pan Phillips type B #10 x 3/8" p.z.	1
23	VW10A10	Rondelle plate 5/16" SAE p.z.	2
24	VW10C322802	Rondelle nylon 0.062" x 1" int. x 1.563 ext.	1
25	VW20A10	Rondelle ressort diamètre 5/16"	2
26	VR11H46	Rivet Pop no 46, tête dôme	2
27	64-0536	Chaîne pour trapèze	2
28	QDF7871	Goupille d'attelage QR	2
29	QE14399-T	Autocollant manufacturier	2
30	QE71-1163-T	Étiquette rangement - Triangle Trapèze	1


Coussins protecteurs côtés de lit mi-longueur (en option)

- DM64232

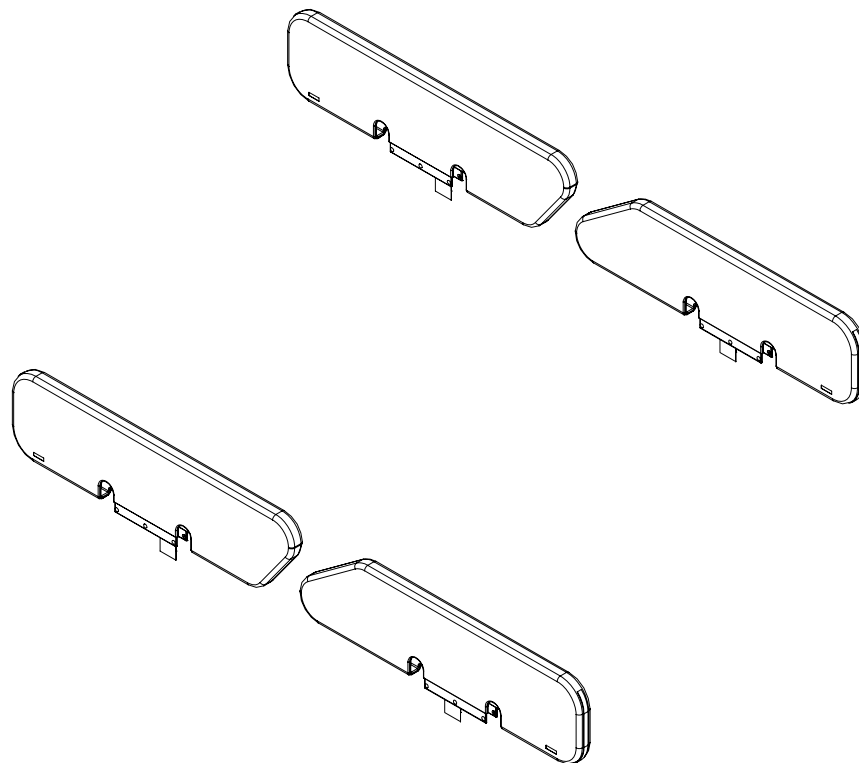

Coussins protecteurs côtés de lit pleine longueur (en option)

- DM64176

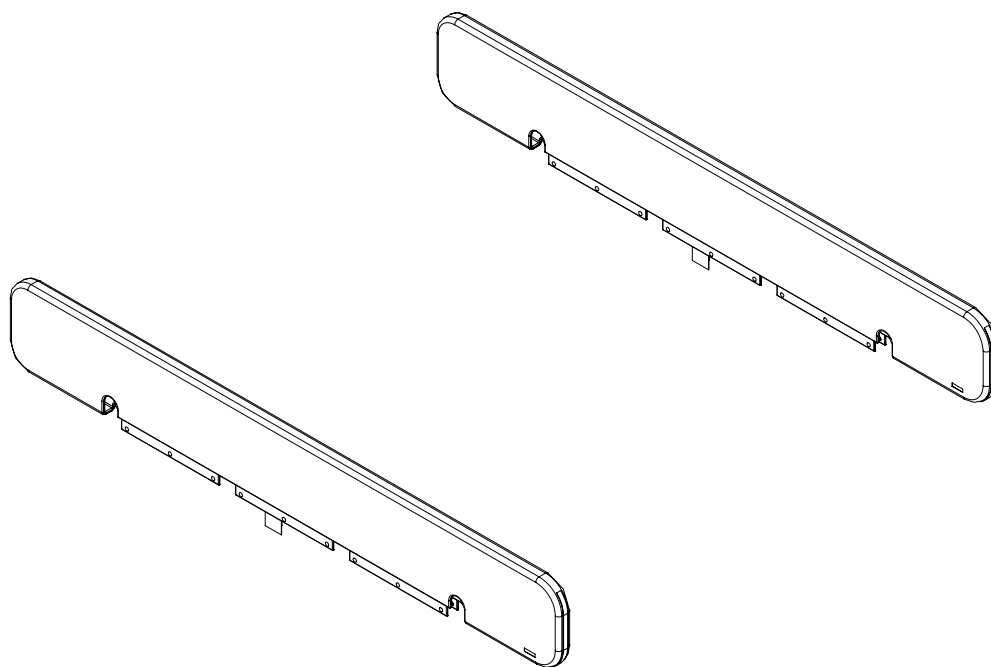

Garantie

GARANTIE LIMITÉE

La division Stryker Médical, une filiale de Stryker Corporation, garantit au premier acheteur que le lit manuel MedSurg modèle FL23P est exempt de toute défectuosité matérielle et de main-d'oeuvre pour une durée de une (1) année après la date de livraison. L'obligation de Stryker sous cette garantie est expressément limitée à fournir des pièces de remplacement et de la main-d'oeuvre ou de remplacer, à son option, tout produit qui est, à la seule discrétion de Stryker, défectueux. Si Stryker en fait la demande, les produits et pièces pour lesquels une réclamation est faite doivent être retournés prépayés à l'usine. Toute utilisation inappropriée, modification ou réparation par d'autre personnel que celui de Stryker de telle manière que le produit est touché matériellement ou adversement selon l'avis de Stryker annule cette garantie. Toute réparation de produits Stryker effectuée avec des pièces non fournies ou non approuvées par Stryker annulera cette garantie. Aucun employé ou représentant de Stryker ne peut modifier cette garantie.

Les produits de type lit de Stryker Médical sont conçus pour une durée de vie prévue de 15 années dans des conditions et avec une utilisation normale ainsi qu'avec un entretien périodique approprié tel que décrit dans le manuel d'entretien pour chaque appareil. Stryker garantit au premier acheteur que les soudures sur ses produits de type lit seront exemptes de toute défectuosité pour la durée de vie prévue de 15 années du produit de type lit tant que le premier acheteur sera propriétaire du produit.

Cette déclaration constitue la garantie complète de Stryker pour l'équipement nommé ci-dessus. **Stryker ne fait aucune autre garantie ou représentation, expresse ou tacite, à l'exception de ce qui a été mentionné dans ce document. Il n'y a pas de garantie de commerciabilité ni de garantie de conformité pour tout but spécifique. Stryker ne peut être tenu responsable pour tout dommage relatif ou corrélatif découlant de la vente ou de l'utilisation de ce type d'équipement.**

PIÈCES ET SERVICE

Les produits de Stryker sont supportés par un réseau d'agents de service international. Ces agents sont spécialement formés en usine et ont, en leur possession, un inventaire de pièces de remplacement afin de diminuer le temps de réparation. Contactez votre représentant local ou téléphonez à notre service technique aux États-Unis: 1 800 327-0770 (option 2) ou au Canada: 1 888 233-6888.

COUVERTURE DES CONTRATS DE SERVICE

Stryker a développé un programme de service avec des options pour garder vos équipement opérationnels à un haut niveau de performance et aussi pour éliminer les coûts de réparation inattendue. Nous recommandons que ces programmes soient activés avant la fin de la garantie initiale afin d'éliminer les risques potentiels d'augmentation de coûts d'un éventuel changement de prix de réparation d'équipement.

Un contrat de service aide à :

- Assurer le rendement des produits
- Stabiliser les coûts des budgets d'entretien
- Diminuer les mises hors service
- Établir la documentation pour le JACHO
- Augmenter la durée de vie du produit
- Augmenter la valeur de revente
- Superviser les risques et la sécurité

Garantie

PROGRAMMES DE CONTRATS DE SERVICE

Stryker offre les programmes de service suivants :

Options de service*	Or	Argent	Pièces	Main-d'oeuvre	Entretien pièces
Entretien préventif annuel	X				X
Toutes pièces	X	X	X		
Main-d'oeuvre et déplacement	X	X		X	
Appels d'urgence de service illimités	X	X		X	
Priorité de contact : réponse téléphonique en deux heures	X	X	X	X	
La majorité des réparations faites en 3 jours	X	X		X	
Documentation JACHO	X	X		X	X
Un journal personnalisé d'entretien pièces et service d'urgence	X				X
Les services d'un technicien formé par Stryker	X	X		X	X
Pièces de remplacement d'origine de Stryker	X	X	X	X	X
Service pendant les heures régulières de bureau (8 h à 17 h)	X	X	X	X	X

* N'inclus pas l'entretien causé par des abus ou l'usure normale des pièces. Stryker se réserve le droit de modifier les options sans préavis.

Stryker Médical offre aussi des contrats de service personnalisés.
Le prix est déterminé par l'âge, la localisation, le modèle et la condition du produit.

**Pour plus d'informations sur nos contrats de services,
veuillez contacter votre représentant local.**

AUTORISATION DE RETOUR

Le retour de marchandise doit être approuvé par le département de Service à la clientèle de Stryker. Un numéro d'autorisation de retour vous sera donné et devra être écrit sur toute marchandise retournée. Stryker se réserve le droit de charger les coûts d'envoi et d'entreposage des produits retournés. **Les pièces spéciales, modifiées ou discontinuées ne peuvent pas être retournées.**

MARCHANDISE ENDOMMAGÉE

Les règles ICC demandent que les réclamations pour marchandise endommagée soient faites directement au transporteur dans les quinze (15) jours suivant la réception de ladite marchandise. **N'acceptez pas de colis endommagés à moins que ces dommages ne soient inscrits sur le bon de livraison.** Avec une demande rapide, Stryker fera une réclamation au transporteur pour les dommages causés à la marchandise. Les réclamations seront limitées aux coûts de remplacement. Dans l'éventualité que ces informations ne soient pas transmises à Stryker dans les quinze (15) jours suivant la date de livraison de la marchandise ou que les dommages n'aient pas été inscrits sur le bon de livraison, le client devra assumer le paiement intégral de la facture originale. Les réclamations pour un envoi de remplacement rapide doivent se faire dans les trente (30) jours suivant la date de facturation.

CLAUSE DE GARANTIE INTERNATIONALE

Cette garantie respecte les exigences des garanties aux États-Unis. Les politiques de garantie à l'extérieur des États-Unis peuvent varier selon les régions. Veuillez contacter votre représentant local de Stryker Médical pour davantage de renseignements.

[Retour à la table des matières](#)

ÉTATS-UNIS
Stryker Médical
3800 E. Centre Ave.,
Portage, Michigan USA
49002

CANADA
Stryker Canada
45 Innovation Drive
Hamilton, Ontario Canada
L9H 7L8

EC	REP
----	-----

Représentant européen

Stryker France
ZAC Satolas Green Pusignan
Av. De Satolas Green
69881 MEYZIEU Cedex
France

stryker[®]