

Civière de transport

Manuel d'entretien

REF 747

REF 748



Table des matières

Définition de « Avertissement », « Mise en garde » et « Remarque »	3
Résumé des mesures de sécurité	3
Points de pincement possibles	3
Introduction à l'entretien	4
Durée de vie utile prévue	4
Coordonnées	4
Emplacement du numéro de série	4
Entretien préventif	5
Emplacements à lubrifier	6
Entretien	7
Remplacement d'un ensemble de roulette	7
Remplacement de l'anneau de verrouillage du pivot de frein	9
Remplacement de l'ensemble de maillon de frein, côté tête ou côté pieds	10
Remplacement de la came de frein et de la liaison	10
Remplacement de la tige de frein	11
Remplacement de la tige de frein à commande latérale	13
Remplacement de l'ensemble de cinquième roue	14
Remplacement du vérin, côté tête	15
Remplacement du vérin, côté pieds	17
Relâcher le réglage de la pédale de déblocage	19
Remplacement de la pédale de déblocage, côté pieds (système hydraulique à trois côtés)	19
Remplacement de la tige de la pédale de déblocage, côté pieds (système hydraulique à trois côtés)	20
Retrait du haut du plan de couchage	22
Réglage du verrou de la barrière	23
Éliminer l'excès d'air du système hydraulique	23
Réglage du dossier pneumatique	23
Ensemble de frein standard	25
Ensemble tige de frein	28
Ensemble de maillon d'entraînement de la cinquième roue	30
Ensemble de frein à commande latérale	31
Ensemble tige de frein/commande latérale	35
Ensemble de frein à commande latérale	37
Options de couleurs de pare-chocs	38
Ensemble de roulette de 8 po avec de couvercle complet - 0853-003-615	39
Ensemble de cinquième roue rétractable	41
Vérins de descente non constante	42
Ensemble de cinquième roue - 1105-006-130	43
Ensemble hydraulique à deux côtés	45
Ensemble de pédale d'abaissement - 1105-004-201	48
Ensemble de pédale de pompe, côté tête - 1105-005-285	49
Ensemble d'étiquetage - capot standard	50
Ensemble d'étiquetage - freins à quatre côtés	52
Ensemble de plan de couchage, standard - modèle 747	54
Ensemble de barrière - Modèle 747	58
Ensemble de plan de couchage, relève-buste au châssis - modèle 747	59
Ensemble de plan de couchage, relève-buste pneumatique - modèle 747	60
Ensemble de boîtier externe, droite - 1210-031-106	62
Ensemble de boîtier externe, gauche - 1210-031-107	63
Ensemble de plan de couchage, standard - modèle 748	64
Ensemble de barrière latérale	68
Ensemble de plan de couchage, relève-buste au plan de couchage - modèle 748	69
Ensemble de plan de couchage, relève-buste pneumatique - modèle 748	71
Ensemble de plan de couchage avec option de relève-jambes - modèle 748	73
Ensemble de vis de manivelle du relève-jambes en option	78
Ensemble de protection d'angle	79
Ensemble de protection d'angle avec poignées de poussée en option	80
Ensemble de poignée de poussée	82
Ensemble de protection d'angle avec poignées de poussée et support de perfusion en deux parties en option	83

Ensemble de protection d'angle avec poignées de poussée et support de perfusion en trois parties.....	85
Ensemble de protection d'angle avec support de perfusion en deux parties.....	87
Ensemble de protection d'angle avec support de perfusion en trois parties.....	88
Ensemble de plateau porte-défibrillateur - 1105-045-200	89
Plateau porte-défibrillateur/extension pour les pieds/garde-pieds - 1105-045-400	90
Garde-pieds/porte-dossiers - 1105-045-500	92
Plateau de service - 1105-045-700.....	93
Garde-pieds/porte-plateau de service - 1105-045-800	94
Chariot de perfusion - 0785-155-000	95
Havasu, support de perfusion, amovible - 0390-025-000.....	96
Porte-bouteille vertical - 1115-130-000	97
Ensemble de retenue pour bouteille d'oxygène - 1037-010-090.....	98
Sangle de retenue, chevilles - 0946-043-001	99
Sangle de retenue pour poitrine - 1010-058-000.....	100
Sangle de retenue du poignet - 0946-044-000.....	101
Sangle de retenue, corps - 0390-019-000	102
Sangle de retenue, ensemble complet - 1010-077-000	103
Matelas et coussinets de barrière latérale	104

Définition de « Avertissement », « Mise en garde » et « Remarque »

Les termes **AVERTISSEMENT**, **MISE EN GARDE** et **REMARQUE** ont une signification particulière et doivent faire l'objet d'une lecture attentive.

AVERTISSEMENT

Avertit le lecteur d'une situation qui, si elle n'est pas évitée, pourrait entraîner la mort ou des blessures graves. Peut également attirer l'attention sur l'existence potentielle d'effets indésirables graves ou de risques d'accident.

MISE EN GARDE

Avertit le lecteur d'une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, peut causer des blessures mineures ou modérées à l'utilisateur ou au patient ou endommager le matériel en question ou d'autres biens. Couvre notamment les précautions à prendre afin d'assurer l'utilisation sûre et efficace du dispositif et d'éviter les dommages qui pourraient découler de l'usage ou du mésusage du matériel.

Remarque - Fournit des informations spécifiques destinées à faciliter l'entretien ou à clarifier des instructions importantes.

Résumé des mesures de sécurité

Toujours lire et respecter scrupuleusement les avertissements et les mises en garde indiqués sur cette page. Tout entretien doit être effectué exclusivement par du personnel qualifié.

AVERTISSEMENT

- Toujours suivre la procédure de réglage du verrou de la barrière s'il est nécessaire de régler les verrous de la barrière. Les verrous de la barrière sont préréglés en usine et ne nécessitent aucun réglage. Un réglage incorrect de la barrière peut entraîner des blessures chez le patient ou l'opérateur.
-

Points de pincement possibles



Figure 1 – Points de pincement possibles

Introduction à l'entretien

Ce manuel vous aide à entretenir le produit Stryker concerné. Lire ce manuel pour entretenir ce produit. Ce manuel ne traite pas du fonctionnement de ce produit. Consulter le manuel d'utilisation pour les instructions d'utilisation. Pour consulter le manuel d'utilisation ou le manuel d'entretien en ligne, aller sur le site <https://techweb.stryker.com/>.

Durée de vie utile prévue

Le brancard de transport a une durée de vie utile prévue de 10 ans dans des conditions normales d'utilisation et en respectant l'entretien périodique approprié.

Coordonnées

Contactez le service clientèle ou le support technique de Stryker au moyen des coordonnées suivantes : +1-800-327-0770.


Stryker Medical
3800 E. Centre Avenue
Portage, MI 49002
États-Unis

Remarque - L'utilisateur et/ou le patient doivent signaler tout incident grave lié au produit à la fois au fabricant et à l'autorité compétente de l'État membre européen où l'utilisateur et/ou le patient sont établis.

Pour consulter votre mode d'emploi ou votre manuel d'entretien en ligne, consultez <https://techweb.stryker.com/>.

Avoir le numéro de série (A) du produit Stryker à disposition avant d'appeler le service clientèle ou le support technique de Stryker. Inclure le numéro de série dans toutes les communications écrites.

Emplacement du numéro de série

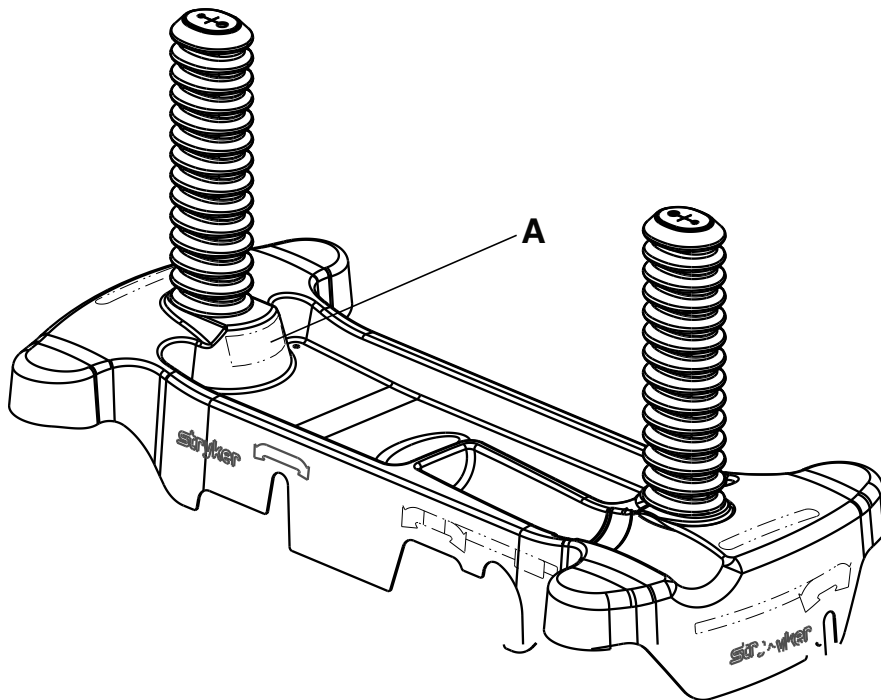

Entretien préventif

Mettre le produit hors service avant d'effectuer les vérifications d'entretien préventif. Vérifier tous les éléments mentionnés pendant l'entretien préventif annuel pour tous les produits Stryker Medical. Il peut être nécessaire d'effectuer les vérifications d'entretien préventif plus fréquemment en fonction du degré d'utilisation du produit. Toute réparation doit être effectuée exclusivement par du personnel qualifié.

Remarque - Nettoyer et désinfecter l'extérieur du matelas avant inspection, le cas échéant.

Inspecter les éléments suivants :

- _____ Toutes les soudures
- _____ Toutes les attaches sont correctement fixées
- _____ Fonctionnement correct du mécanisme de frein
- _____ Fonctionnement correct de la fonction de guidage
- _____ Élévation, abaissement et verrouillage corrects des barrières
- _____ Blocage correct des roulettes quand les freins sont enclenchés
- _____ Blocage et pivotement corrects des roulettes
- _____ Absence de cire et de débris sur les roulettes
- _____ Élévation, abaissement et verrouillage corrects du relève-buste
- _____ Élévation, abaissement et verrouillage corrects du relève-jambes
- _____ État intact des revêtements
- _____ Élévation et abaissement corrects de la fonction décline/proclive à partir de tous les emplacements
- _____ État intact et verrouillage correct dans toutes les positions du support de perfusion en option
- _____ État intact et ouverture/fermeture corrects du support pour bouteille d'oxygène en option
- _____ Absence d'endommagement des plateaux côté tête et côté pieds
- _____ Chaîne de mise à la terre intacte
- _____ Blocage et fixation corrects des sangles de retenue du corps en option
- _____ Absence de déchirures ou fissures dans la housse de matelas
- _____ Bon état et fonctionnement correct des accessoires et du matériel de montage
- _____ Absence de fuites au niveau des raccords hydrauliques
- _____ Résistance adéquate des vérins hydrauliques
- _____ Vitesse d'abaissement hydraulique réglée
- _____ Niveau suffisant de l'huile hydraulique
- _____ Lubrifier selon les besoins (*Emplacements à lubrifier* (page 6))

Numéro de série du produit :
Effectué par :
Date :

Emplacements à lubrifier

Avec le relève-buste placé à 0°, appliquer de la graisse Syntech (3000-200-719) par la fente et le trou dans l'ensemble des vis de manivelle (Figure 2). Essuyer l'excès de graisse.

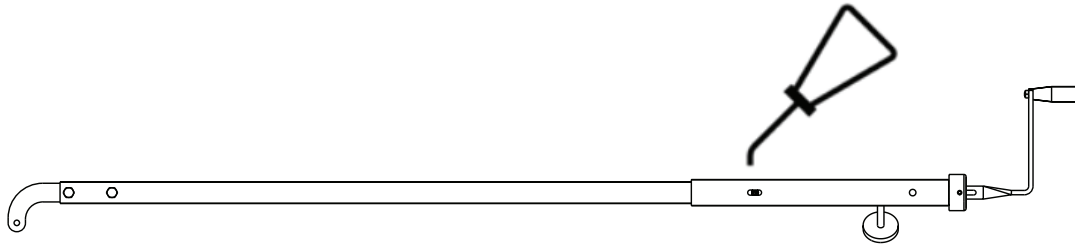


Figure 2 – Lubrification des vis de manivelle

Entretien

Remplacement d'un ensemble de roulette

Outils requis :

- Douille de 1/2 po
- Clé à cliquet de 3/8 po
- Extension de clé de 3/8 po
- Clé dynamométrique de 3/8 po (po-lb)
- Petit vérin
- Pince à becs fins
- Tendeurs élastiques

Procédure :

1. Élever le plan de couchage à la positions maximale.
2. Soulever le capot de la base et soutenir le capot à l'aide de tendeurs élastiques.
3. Élever les deux ridelles et les verrouiller en position haute.
4. Mettre la pédale de frein/guidage (A) en position neutre.
5. À l'aide d'une douille de 1/2 po avec une extension de clé de 3/8 po et une clé à cliquet de 3/8 po, retirer les deux écrous nylon hexagonaux à bride (A) (un de chaque côté) qui fixent l'ensemble de maillon de frein (B) aux roulettes (Figure 3).

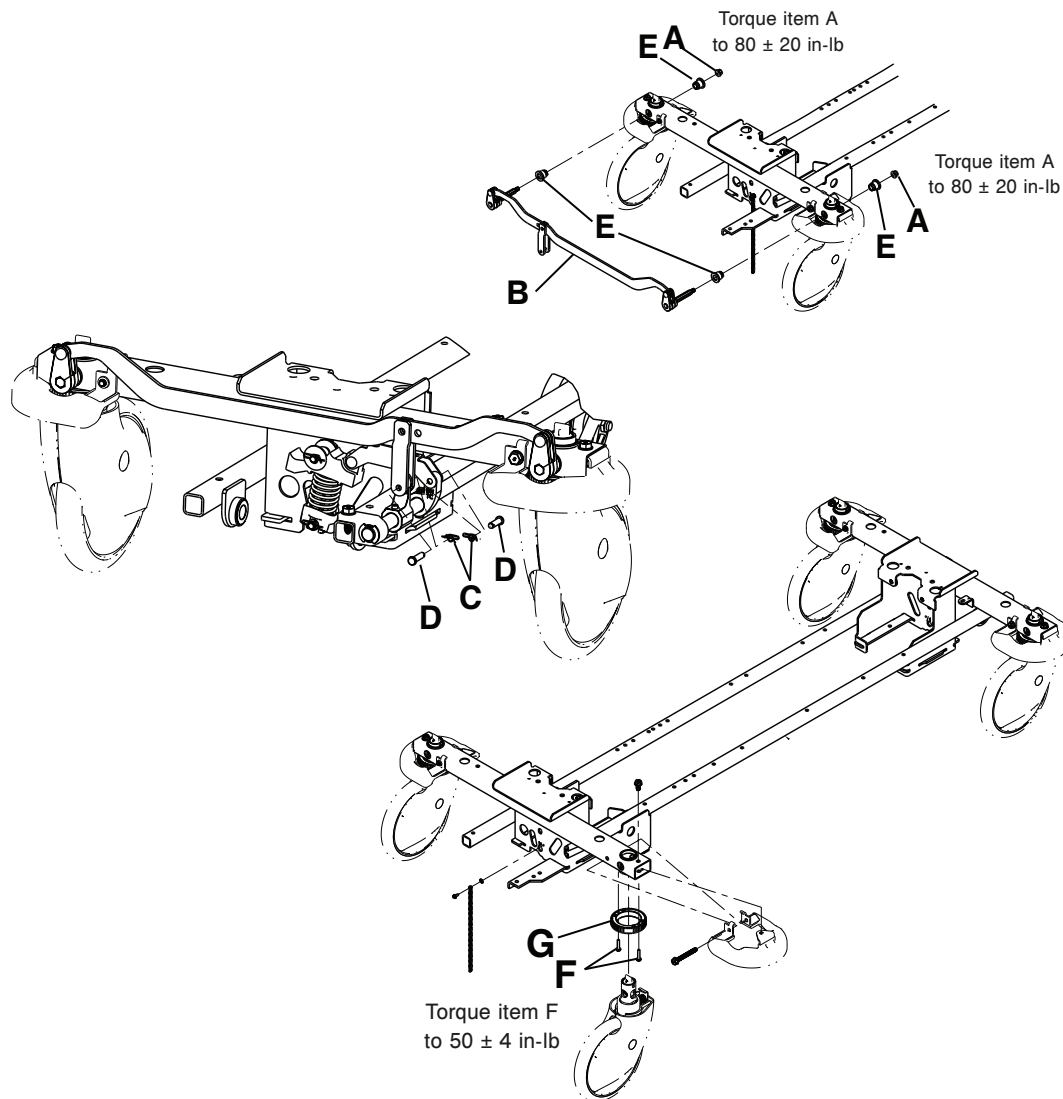


Figure 3 – Composants de l'ensemble de roulette et de frein

6. À l'aide d'une pince à becs fins, retirer la goupille bêta (C) et l'axe à épaulement (D) de l'activateur de tige de frein (Figure 3).
7. Enclencher le frein. Pousser le produit pour vérifier que le frein est verrouillé.
8. Retirer l'ensemble de maillon de frein (B). Tirer vers l'extérieur en exerçant une force égale sur l'ensemble (Figure 3).
9. À l'aide d'un petit vérin, soulever le produit jusqu'à ce que la roulette tombe de la douille du châssis.
10. Positionner la roulette fournie dans le châssis. Abaisser le vérin jusqu'à ce que la roulette soit fixée dans le châssis de la base. Retirer le vérin.

Remarque - S'assurer que la flèche située en haut de la fourche de la roulette pointe vers le côté pieds du produit pour éviter d'endommager le produit.

11. Inverser les étapes pour réinstaller les composants restants. Utiliser une clé dynamométrique de 3/8 po (po-lb) pour serrer les deux écrous nylon hexagonaux à bride (A) qui fixent l'ensemble du maillon de frein (B) aux roulettes à 80 ± 20 po-lb ($9 \pm 2,2$ Nm) (Figure 3).

Remarque - Lors de l'installation de l'ensemble de maillon de frein fourni (B), s'assurer de réinstaller le roulement (E) qui peut être tombé lors du retrait de l'ensemble de maillon de frein (B).

12. S'assurer du fonctionnement correct du produit avant de le remettre en service.

Remplacement de l'anneau de verrouillage du pivot de frein

Outils requis :

- Douille de 1/2 po
- Douille de 5/16 po
- Clé à cliquet de 3/8 po
- Extension de clé de 3/8 po
- Pince à becs fins
- Tendeurs élastiques
- Petit vérin pneumatique
- Clé dynamométrique de 3/8 po (po-lb)

Procédure :

1. Élever le produit à la position maximale.
2. Élever les deux ridelles et les verrouiller en position haute.
3. Soulever le capot de la base et soutenir le capot à l'aide de tendeurs élastiques.
4. Mettre la pédale de frein/guidage (A) en position neutre.
5. À l'aide d'une douille de 1/2 po avec une extension de clé de 3/8 po et une clé à cliquet de 3/8 po, retirer les deux écrous nylon hexagonaux à bride (A) (un de chaque côté) qui fixent l'ensemble de maillon de frein (B) aux roulettes (Figure 3).
6. À l'aide d'une pince à becs fins, retirer la goupille bêta (C) et l'axe à épaulement (D) de l'activateur de tige de frein.
7. Enclencher le frein. Pousser le produit pour vérifier que le frein est verrouillé.
8. Retirer l'ensemble de maillon de frein (B). Tirer vers l'extérieur en exerçant une force égale sur l'ensemble. Conserver l'ensemble du maillon de frein.
9. À l'aide d'un petit vérin pneumatique, soulever le produit jusqu'à ce que la roulette tombe de la douille du châssis. Jeter la roulette.
10. À l'aide d'une douille de 5/16 po avec une extension de clé de 3/8 po et une clé à cliquet de 3/8 po, retirer les deux vis à tête hexagonale à embase (F) qui fixent l'anneau de verrouillage du pivot de frein au châssis de la base. Retirer et jeter l'anneau de verrouillage du pivot de frein.
11. À l'aide d'une douille de 5/16 po avec une extension de clé de 3/8 po et une clé à cliquet de 3/8 po, installer l'anneau de verrouillage du pivot de frein fourni.

Remarque - Deux goujons s'insèrent dans le châssis de la base lors de l'installation de l'anneau de verrouillage du pivot de frein.

12. Positionner la roulette fournie sur le châssis de la base. Abaisser le vérin jusqu'à ce que la roulette soit fixée dans le châssis de la base. Retirer le vérin.

Remarque - S'assurer que la flèche située en haut de la fourche de la roulette pointe vers le côté pieds du produit. Si la flèche n'est pas orientée vers le côté pieds, l'ensemble de roulette risque d'être endommagé.

13. Inverser la procédure pour réinstaller. À l'aide d'une clé dynamométrique de 3/8 po, serrer les deux écrous nylon hexagonaux à bride (A) qui fixent l'ensemble du maillon de frein (B) aux roulettes à 80 ± 20 po-lb ($9 \pm 2,2$ Nm). À l'aide de la clé dynamométrique de 3/8 po, serrer les deux vis à tête hexagonale à embase (F) qui fixent l'anneau de verrouillage du pivot de frein au châssis de la base à 50 ± 4 po-lb ($5,7 \pm 0,45$ Nm).

Remarque - Lors de l'installation de l'ensemble de maillon de frein fourni, s'assurer de réinstaller le roulement (E) qui peut être tombé lors du retrait de l'ensemble de maillon de frein.

14. S'assurer du fonctionnement correct du produit avant de le remettre en service.

Remplacement de l'ensemble de maillon de frein, côté tête ou côté pieds

Outils requis :

- Douille de 1/2 po
- Clé à cliquet de 3/8 po
- Extension de clé de 3/8 po
- Clé dynamométrique de 3/8 po (po-lb)
- Pince à becs fins
- Tendeurs élastiques

Procédure :

1. Élever le produit à la position maximale.
 2. Élever les deux ridelles et les verrouiller en position haute.
 3. Soulever le capot de la base et soutenir le capot à l'aide de tendeurs élastiques.
 4. Mettre la pédale de frein/guidage (A) en position neutre.
 5. À l'aide d'une douille de 1/2 po avec une extension de clé de 3/8 po et une clé à cliquet de 3/8 po, retirer les deux écrous nylon hexagonaux à bride (A) (un de chaque côté) qui fixent l'ensemble de maillon de frein (B) aux roulettes (Figure 3).
 6. À l'aide d'une pince à becs fins, retirer la goupille bêta (C) et l'axe à épaulement (D) de l'activateur de tige de frein.
 7. Enclencher le frein. Pousser le produit pour vérifier que le frein est verrouillé.
 8. Retirer l'ensemble de maillon de frein (B). Tirer vers l'extérieur en exerçant une force égale sur l'ensemble.
 9. Inverser la procédure pour réinstaller. À l'aide d'une clé dynamométrique de 3/8 po (po-lb), serrer les deux écrous nylon hexagonaux à bride (A) qui fixent l'ensemble de maillon de frein aux roulettes à 80 ± 20 po-lb ($9 \pm 2,2$ Nm).
- Remarque** - Lors de l'installation de l'ensemble de maillon de frein, veillez à réinstaller le roulement (E) qui peut être tombé lors de la dépose de l'ensemble de maillon de frein.
10. S'assurer du fonctionnement correct du produit avant de le remettre en service.

Remplacement de la came de frein et de la liaison

Outils requis :

- Pince à becs fins
- Tendeurs élastiques

Procédure :

1. Élever le produit à la position maximale.
2. Élever les deux ridelles et les verrouiller en position haute.
3. Soulever le capot de la base et soutenir le capot à l'aide de tendeurs élastiques.
4. Mettre la pédale de frein/guidage (A) en position neutre.
5. À l'aide d'une pince à becs fins, retirer la goupille bêta (A) et l'axe à épaulement (B) qui fixent la came de frein et l'ensemble de liaison à la tige de frein (Figure 4).

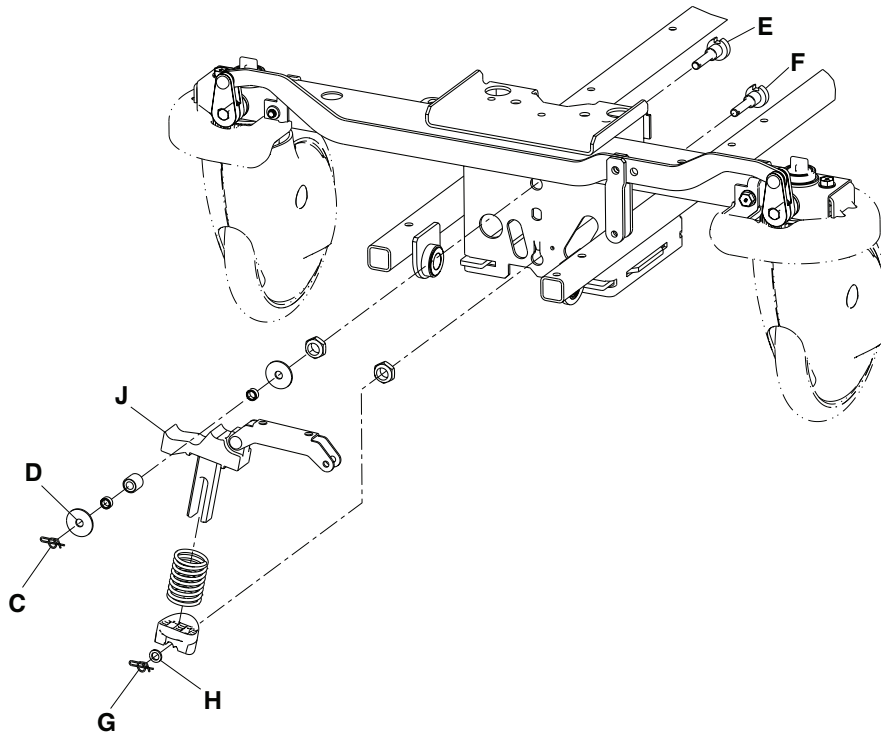


Figure 4 – Jeter la came de frein et l'ensemble de maillon

6. À l'aide d'une pince à becs fins, retirer la goupille bêta (C) et la rondelle (D) du support du roulement du pivot (E).
7. À l'aide d'une pince à becs fins, retirer la goupille bêta (G) et la rondelle en plastique (H) du support inférieur (F).
8. Soulever la came de frein et l'ensemble de liaison (J) de l'actionneur de la tige de frein et tirer vers l'extérieur sur l'ensemble.
9. Inverser la procédure pour réinstaller.

Remarque - Lors de l'installation de l'ensemble de came de frein et de liaison, installer d'abord le bas, puis pousser vers le bas et vers l'intérieur pour installer l'ensemble sous le roulement supérieur.

10. S'assurer du fonctionnement correct du produit avant de le remettre en service.

Remplacement de la tige de frein

Outils requis :

- Douille de 1/2 po
- Clé dynamométrique de 3/8 po (pi-lb)
- Clé à cliquet de 3/8 po
- Pince à becs fins

Procédure :

1. Élever le plan de couchage à la hauteur maximum.
2. Soulever le capot de la base et soutenir le capot à l'aide de tendeurs élastiques.
3. Élever les barrières et les verrouiller en position haute.
4. Mettre le produit en position de guidage.
5. Au niveau de la tête, à l'aide d'une pince à becs fins, retirer la goupille bêta (A) et l'axe à épaulement (B) qui fixent l'ensemble du maillon de frein du côté tête à la manivelle d'activation du frein Figure 5. Retirer le capuchon de la manivelle de la tige de frein. Conserver la goupille bêta, l'axe à épaulement et le capuchon de la manivelle de la tige de frein.

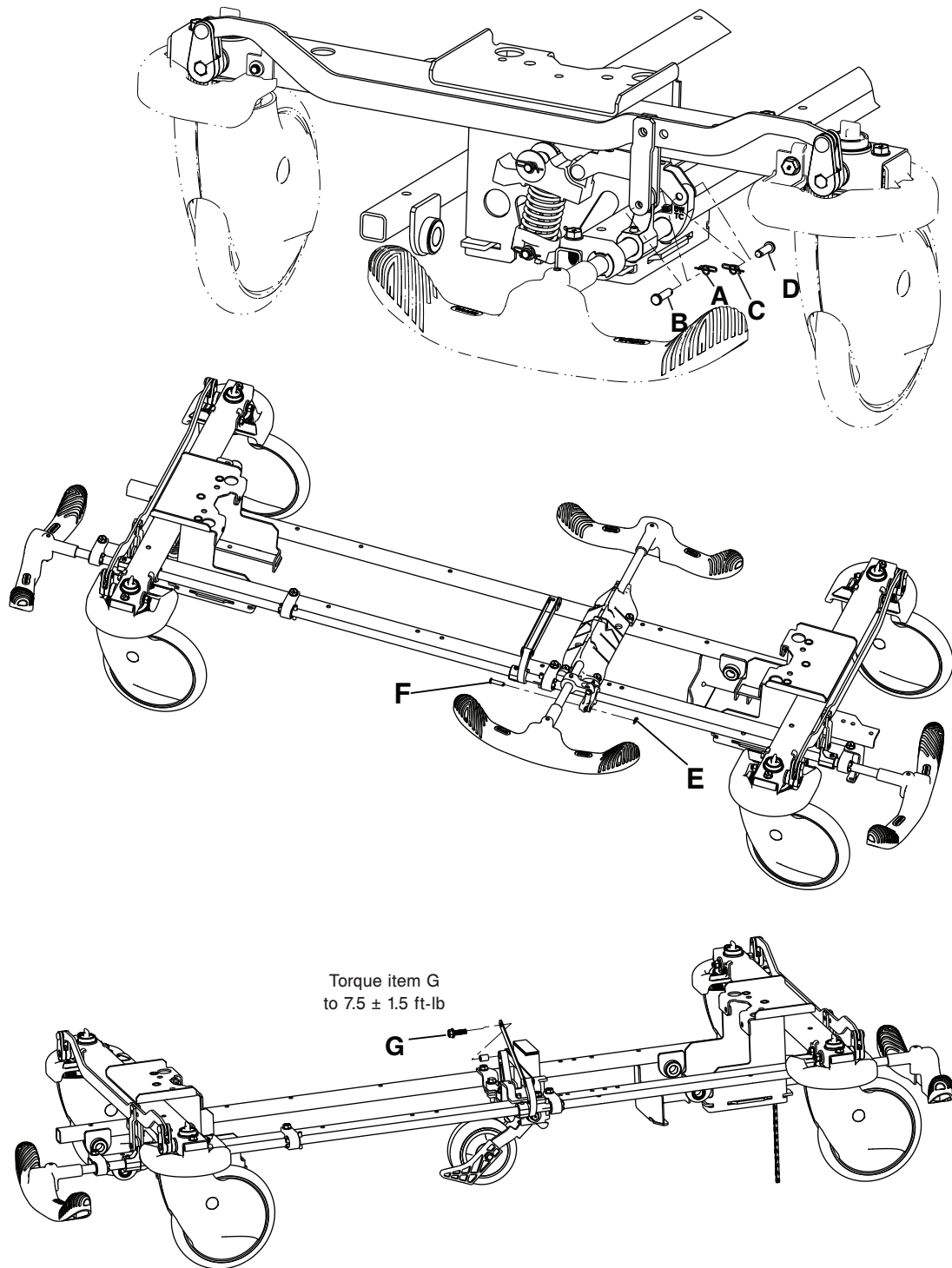


Figure 5 – Remplacer la tige de frein

6. À l'aide d'une pince à becs fins, retirer la goupille bêta (C) et l'axe à épaulement (D) qui fixent la came de frein et l'ensemble de liaison à l'ensemble de tige de frein. Conserver la goupille bêta et l'axe à épaulement.
7. Au niveau des pieds, à l'aide d'une pince à becs fins, retirer la goupille bêta (C) et l'axe à épaulement (D) qui fixent l'ensemble de maillon de frein du côté pieds à la manivelle d'activation du frein. Retirer le capuchon de la manivelle de la tige de frein. Conserver la goupille bêta, l'axe à épaulement et le capuchon de la manivelle de la tige de frein.
8. Si le produit est équipé de freins à quatre côtés, passer à l'étape 9. Si le produit est équipé des freins standard, passer à l'étape 10.

9. À l'aide d'une pince à becs fins, retirer la goupille bêta (E) et l'axe à épaulement (F) qui fixent l'ensemble de frein de commande latérale au maillon de tige de frein de commande latérale. Conserver la goupille bêta et l'axe à épaulement.
10. À l'aide d'une douille de 1/2 po et d'une clé à cliquet de 3/8 po, retirer la vis à tête hexagonale à embase (G) et le roulement à douille qui fixent l'ensemble de maillon d'entraînement de la cinquième roue à l'ensemble de la tige de frein. Conserver la vis et le roulement à douille. Lors de la réinstallation des vis, utiliser une clé dynamométrique de 3/8 po pour serrer les vis à un couple de $7,5 \pm 1,5$ pi-lb ($10,1 \pm 2$ Nm).
11. Du côté pieds du produit, utiliser une pince à becs fins pour déconnecter le ressort de retour (H).
12. À l'aide d'une douille de 1/2 po et d'une clé à cliquet de 3/8 po, retirer les quatre vis à tête hexagonale à embase (J) qui fixent les supports de tige de frein à l'ensemble de tige de frein. Retirer le crochet de ressort de retour (K) (Figure 6). Conserver les vis et le crochet du ressort de retour. Lors de la réinstallation des vis à tête hexagonale à embase, utiliser une clé dynamométrique de 3/8 po pour serrer les vis à tête hexagonale à embase à $7,5 \pm 1,5$ pi-lb ($10,1 \pm 2$ Nm).

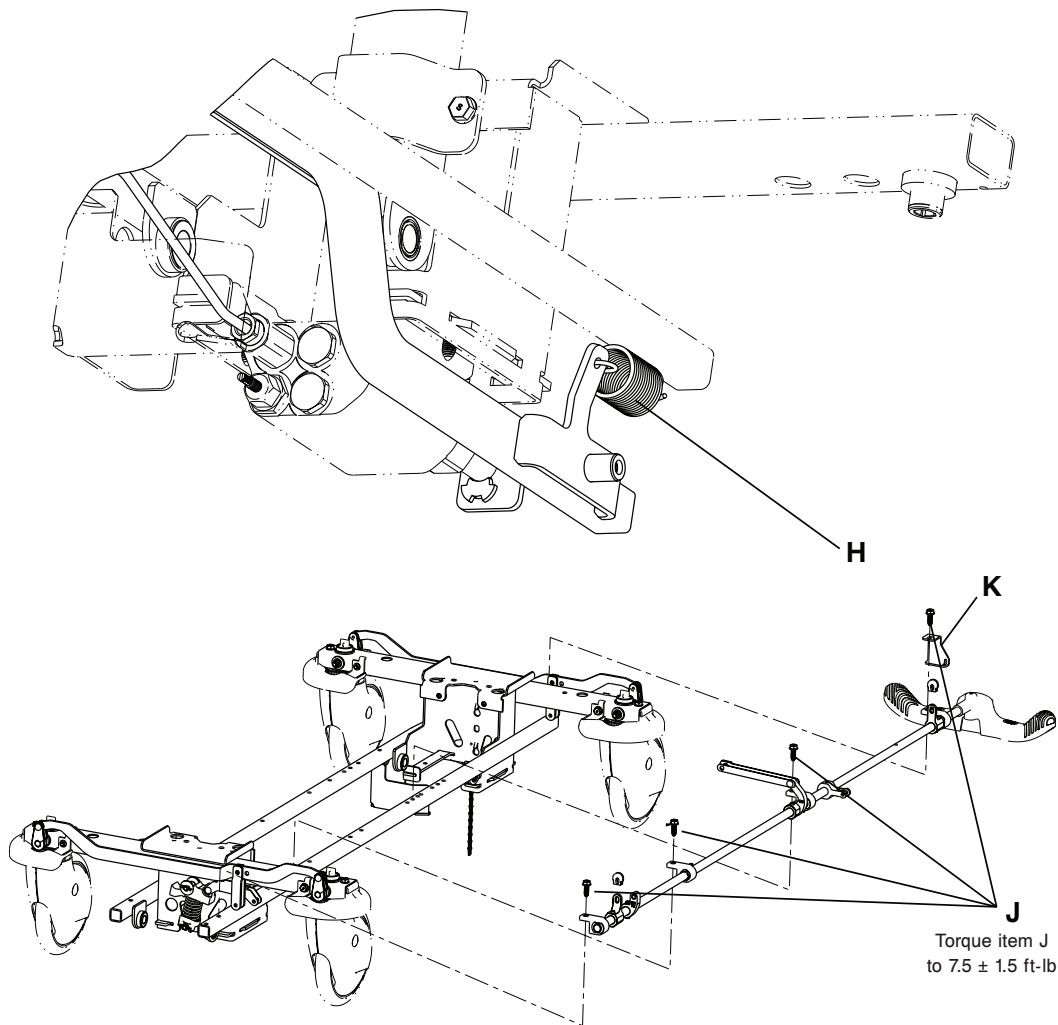


Figure 6 – Remplacer la tige de frein - côté pieds

13. Inverser les étapes pour réinstaller.
14. S'assurer du fonctionnement correct du produit avant de le remettre en service.

Remplacement de la tige de frein à commande latérale

Outils requis

- Douille de 1/2 po
- Clé dynamométrique de 3/8 po (pi-lb)

- Clé à cliquet de 3/8 po
- Pince à becs fins
- Tendeurs élastiques

Procédure :

1. Élever le plan de couchage à la positions maximale.
2. Élever les barrières et les verrouiller en position haute.
3. Soulever le capot de la base et soutenir le capot à l'aide de tendeurs élastiques.
4. Enclencher le frein. Pousser le produit pour vérifier que le frein est verrouillé.
5. À l'aide d'une pince à becs fins, retirer la goupille bêta (A) et l'axe à épaulement (B) qui fixent l'ensemble de frein à commande latérale au maillon de tige de frein à commande latérale (Figure 7). Conserver la goupille bêta et l'axe à épaulement.

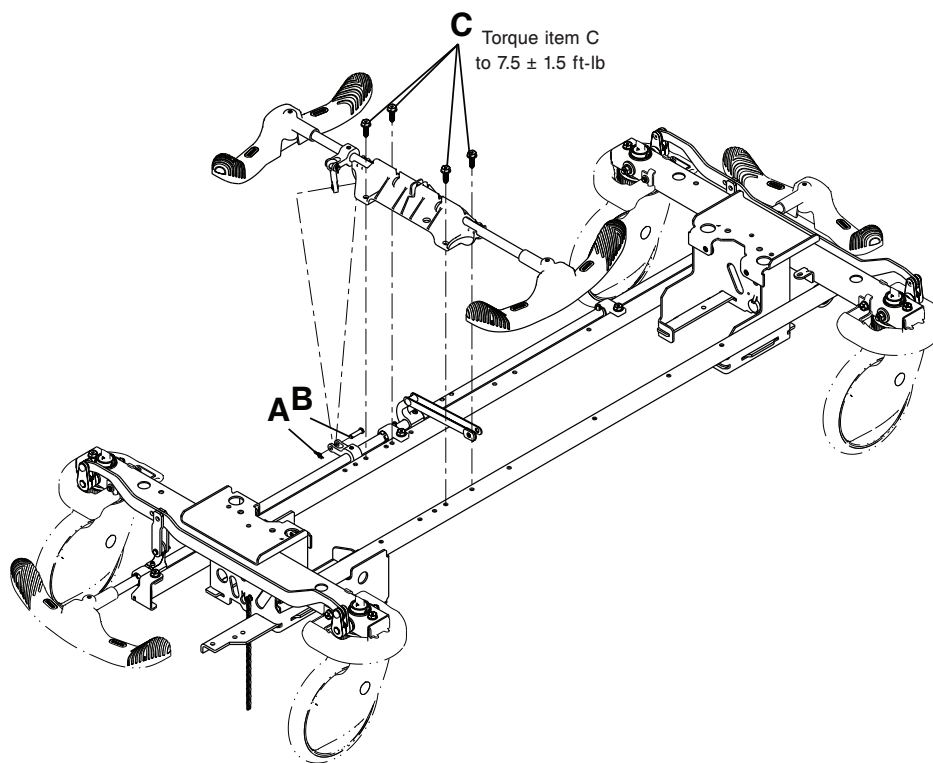


Figure 7 – Remplacer la tige de frein de la commande latérale

6. À l'aide d'une douille de 1/2 po et d'une clé à cliquet de 3/8 po, retirer les quatre vis à tête hexagonale à embase (C) qui fixent l'ensemble de tige de frein à commande latérale à l'ensemble de base. Jeter l'ensemble. Conserver les vis. Lors de la réinstallation des vis, utiliser une clé dynamométrique de 3/8 po pour serrer les vis à un couple de $7,5 \pm 1,5$ pi-lb ($10,1 \pm 2$ Nm).
7. Inverser les étapes pour installer l'ensemble de tiges de frein de commande latérale fourni.
8. S'assurer du fonctionnement correct du produit avant de le remettre en service.

Remplacement de l'ensemble de cinquième roue

Outils requis :

- Douille de 1/2 po
- Clé à cliquet de 3/8 po
- Clé dynamométrique de 3/8 po (pi-lb)

- Pince à becs fins
- Tendeurs élastiques

Procédure :

1. Élever le plan de couchage à la positions maximale.
2. Élever les deux ridelles et les verrouiller en position haute.
3. Soulever le capot de la base et soutenir le capot à l'aide de tendeurs élastiques.
4. À l'aide d'une douille de 1/2 po avec une clé à cliquet de 3/8 po, retirer la vis à tête hexagonale à embase (B) qui fixe le maillon d'entraînement de la cinquième roue à came à la came (Figure 8).

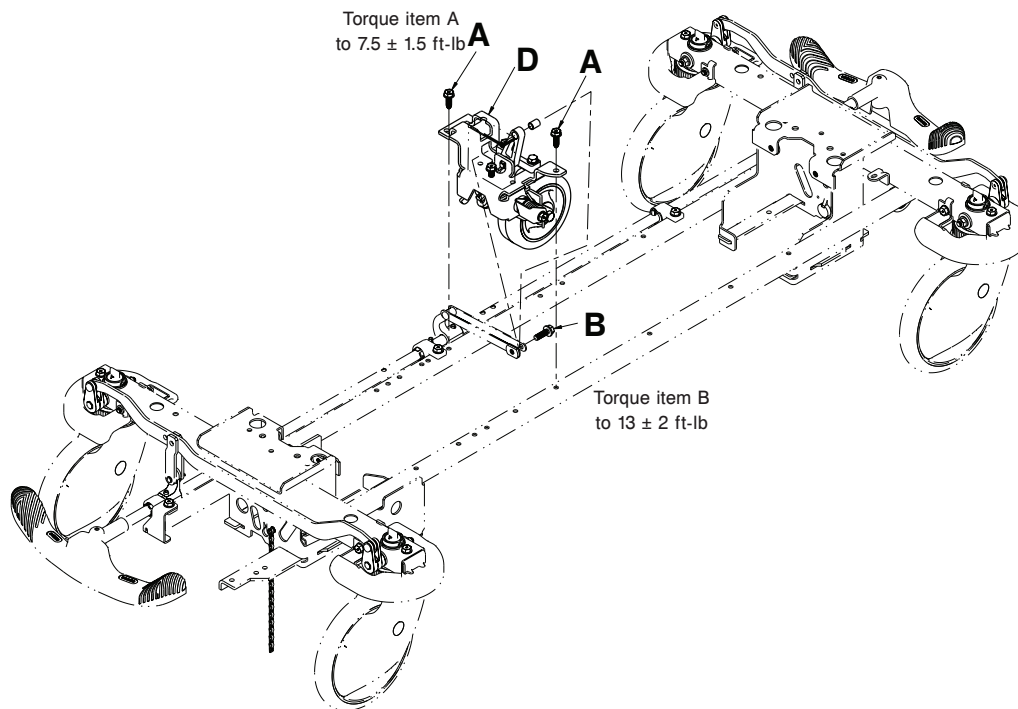


Figure 8 – Remplacer l'ensemble de la cinquième roue

5. À l'aide d'une douille de 1/2 po avec une clé à cliquet de 3/8 po, retirer les deux vis à tête hexagonale à embase (A) qui fixent l'ensemble de cinquième roue (D) au châssis de la base.
6. À l'aide d'une pince à becs fins, retirer le ressort de retour de la pédale de la pompe du support de la cinquième roue.
7. À l'aide d'une pince à becs fins, retirer la goupille bêta qui fixe la tige de déblocage du vérin côté pieds à l'ensemble soudé de la pédale de déblocage.
8. Retirer la tige de déblocage du vérin côté pieds.
9. En travaillant du côté gauche du patient, tourner la cinquième roue dans le sens antihoraire. Soulever et sortir la cinquième roue.
10. Inverser la procédure pour réinstaller.
11. À l'aide d'une clé dynamométrique de 3/8 po, serrer les deux vis à tête hexagonale à embase (A) à $7,5 \pm 1,5$ pi-lb ($10,1 \pm 2$ Nm). Serrer la vis à tête hexagonale à embase (B) à 13 ± 2 pi-lb ($17,6 \pm 2,7$ Nm).
12. S'assurer du fonctionnement correct du produit avant de le remettre en service.

Remplacement du vérin, côté tête

Outils requis :

- Douille de 1/2 po

- Clé à cliquet de 3/8 po
- Extension de clé de 3/8 po
- Clé dynamométrique de 3/8 po (pi-lb)

Procédure :

1. Enclencher le frein. Pousser le produit pour vérifier que le frein est verrouillé.
2. Retirer le plan de couchage du produit (*Retrait du haut du plan de couchage* (page 22)).
3. Soulever le capot du châssis de la base et le mettre de côté.
4. Du côté tête du produit, utiliser une douille de 1/2 po avec une extension de clé de 3/8 po et une clé à cliquet de 3/8 po pour retirer les deux vis à tête hexagonale à embase (B) qui fixent le vérin du côté tête et le clamp du réservoir (F) au châssis de la base et retirer le clamp (Figure 9).

Remarque - Deux intervenants sont nécessaires pour réinstaller le haut du plan de couchage.

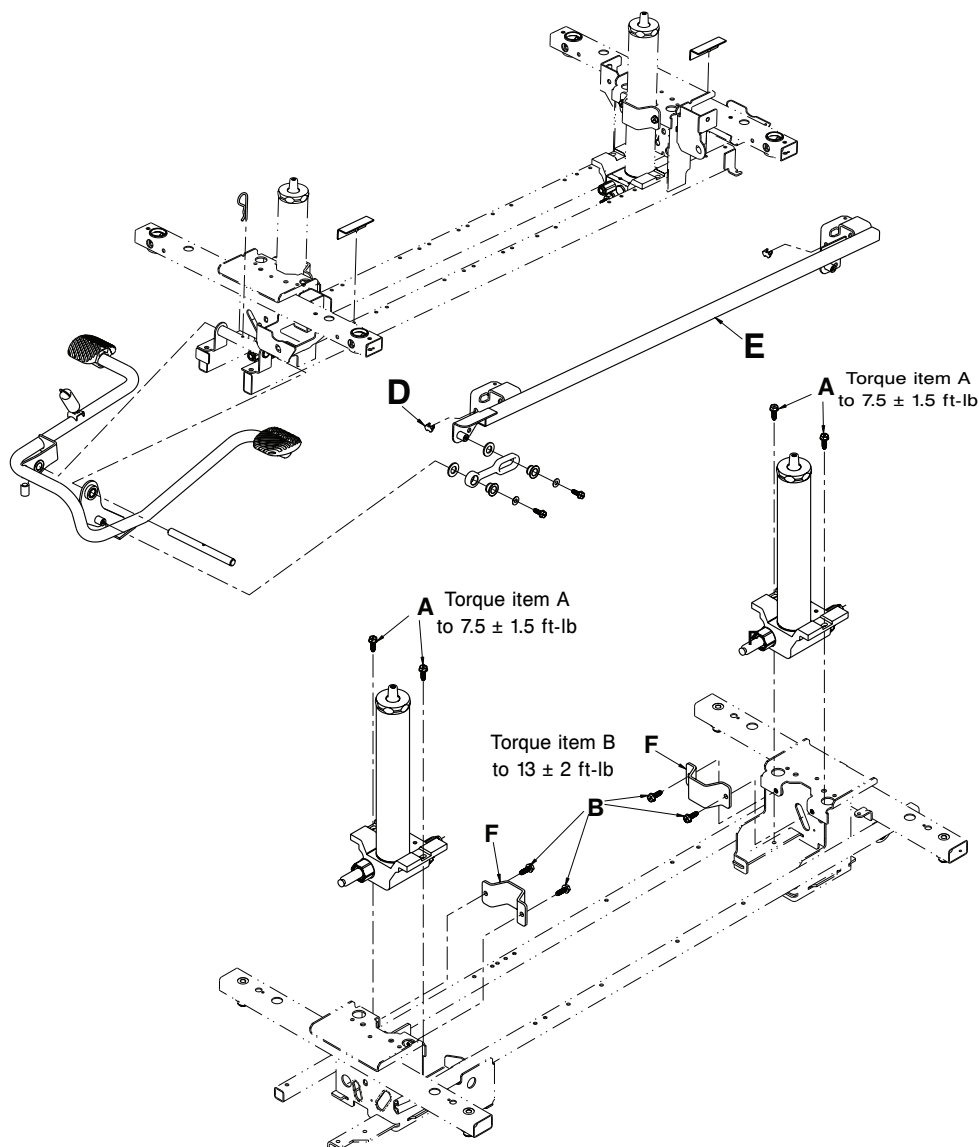


Figure 9 – Remplacer le vérin

5. Soulever la tige de connexion de la pompe et déconnecter le piston de la pompe de la tige de connexion.
6. Déconnecter le pivot de la pédale de déblocage des broches de l'ensemble soudé du levier de déblocage.
7. Retirer la tige de déblocage du côté tête du clapet de déblocage sur l'ensemble de vérin.

8. Utiliser une douille de 1/2 po avec une extension de clé de 3/8 po et une clé à cliquet de 3/8 po pour retirer les deux vis à tête hexagonale à embase (A) qui fixent l'ensemble de la base du vérin au châssis de la base.
9. Retirer l'ensemble de vérin.
10. Positionner l'ensemble de vérin fourni sur le châssis de la base.
11. Installer les vis à tête hexagonale à embase sur le vérin et le clamp du réservoir, mais ne pas les serrer.
12. Réinstaller la tige de connexion de la pompe et la tige de déblocage.
13. Appuyer sur la pédale de la pompe jusqu'au sol pour positionner le vérin sur le châssis de la base.
14. Serrer les vis à tête hexagonale à embase (B) sur le vérin et le clamp du réservoir (F). À l'aide d'une clé dynamométrique de 3/8 po, serrer les quatre vis à tête hexagonale à embase de 13 ± 2 pi-lb ($17,6 \pm 2,7$ Nm).
15. Installer les vis à tête hexagonale à embase (A) qui fixent l'ensemble de la base du vérin au châssis de la base. À l'aide d'une clé dynamométrique de 3/8 po, serrer les quatre vis à tête hexagonale à embase à $7,5 \pm 1,5$ pi-lb ($10,1 \pm 2$ Nm).
16. Réinstaller le capot.
17. Réinstaller le haut du plan de couchage (*Retrait du haut du plan de couchage (page 22)*).
18. Élever le plan de couchage à la positions maximale. Appliquer du poids au plan de couchage pour s'assurer que les vérins se maintiennent et ne se déboîtent pas.
19. S'assurer du fonctionnement correct du produit avant de le remettre en service.

Remarque - La vitesse de descente du vérin est réglée en usine. Ne pas régler le débit.

Remplacement du vérin, côté pieds

Outils requis :

- Douille de 1/2 po
- Clé à cliquet de 3/8 po
- Extension de clé de 3/8 po
- Clé dynamométrique de 3/8 po (pi-lb)

Procédure :

1. Enclencher le frein. Pousser le produit pour vérifier que le frein est verrouillé.
2. Retirer le plan de couchage du produit (*Retrait du haut du plan de couchage (page 22)*).
3. Soulever le capot du châssis de la base et le mettre de côté.
4. À l'aide d'une douille de 1/2 po avec une extension de clé de 3/8 po et une clé à cliquet de 3/8 po, retirer les deux vis à tête hexagonale à embase (B) qui fixent le vérin et le clamp du réservoir (F) au châssis de la base et retirer le clamp (Figure 9).

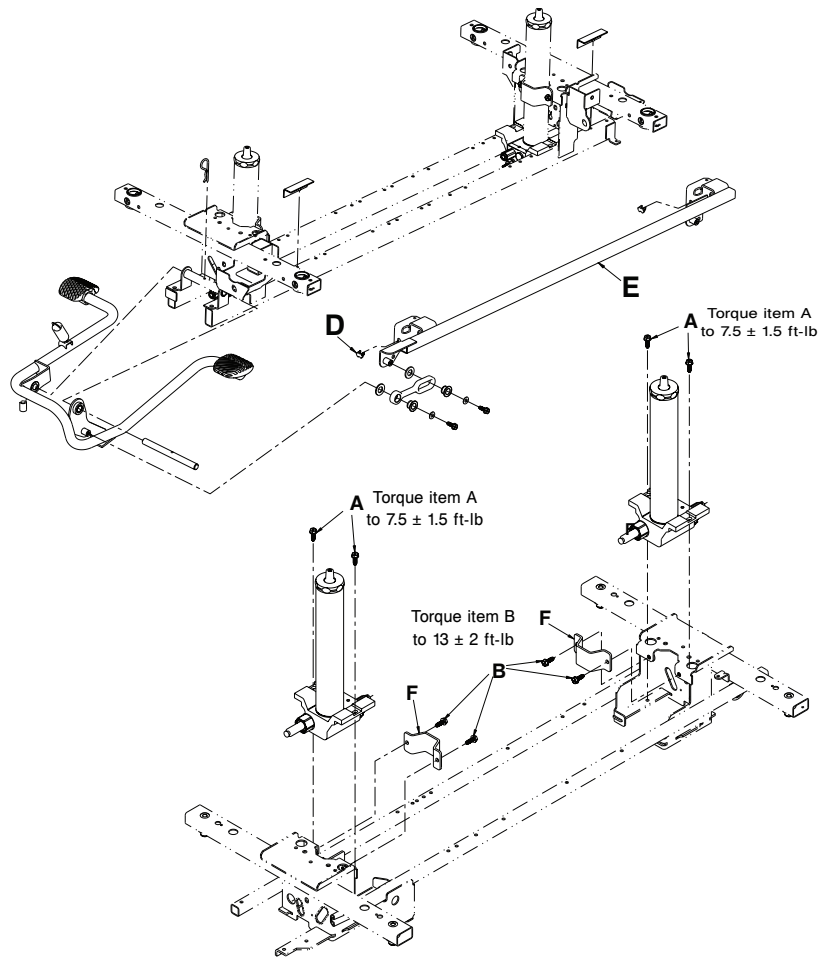


Figure 10 – Remplacer le vérin

5. Déconnecter le pivot de la pédale de déblocage des broches de l'ensemble soudé du levier de déblocage.
6. Retirer la tige de déblocage du côté pieds du clapet de déblocage sur l'ensemble de vérin.
7. Retirer le bouchon du piston de la pompe avec la main.
8. Déconnecter le piston de la pompe du vérin de la tige de connexion de la pompe.
9. Utiliser une douille de 1/2 po avec une extension de clé de 3/8 po et une clé à cliquet de 3/8 po pour retirer les deux vis à tête hexagonale à embase (A) qui maintiennent l'ensemble de la base du vérin au châssis de la base.
10. Retirer l'ensemble de vérin.
11. Positionner l'ensemble de vérin fourni sur le châssis de la base.
12. Installer les vis à tête hexagonale à embase sur le vérin et le clamp du réservoir, mais ne pas les serrer.
13. Réinstaller la tige de connexion de la pompe, la tige de déblocage et le bouchon du piston de la pompe.
14. Appuyer sur la pédale de la pompe jusqu'au sol pour positionner le vérin sur le châssis de la base.
15. Serrer les vis à tête hexagonale à embase (B) sur le vérin et le clamp du réservoir (F). À l'aide d'une clé dynamométrique de 3/8 po, serrer les quatre vis à tête hexagonale à embase de 13 ± 2 pi-lb ($17,6 \pm 2,7$ Nm).
16. Installer les vis à tête hexagonale à embase (A) qui fixent l'ensemble de la base du vérin au châssis de la base. À l'aide d'une clé dynamométrique de 3/8 po, serrer les quatre vis à tête hexagonale à embase à $7,5 \pm 1,5$ pi-lb ($10,1 \pm 2$ Nm).
17. Réinstaller le capot.
18. Réinstaller le haut du plan de couchage.

Remarque - Deux intervenants sont nécessaires pour réinstaller le haut du plan de couchage.

19. Élever le plan de couchage à la positions maximale. Appliquer du poids au plan de couchage pour s'assurer que les vérins se maintiennent et ne se déboîtent pas.

20. S'assurer du fonctionnement correct du produit avant de le remettre en service.

Remarque - La vitesse de descente du vérin est réglée en usine. Ne pas régler le débit.

Relâcher le réglage de la pédale de déblocage

Outils requis :

- Pince à becs fins
- Tendeurs élastiques

Procédure :

1. Soulever le capot de la base et soutenir le capot à l'aide de tendeurs élastiques.
2. À l'aide d'une pince à becs fins, retirer la goupille bêta de l'ensemble de pédale de déblocage.
3. Retirer le joint à épaulement de l'ensemble de pédale de déblocage.
4. Pour augmenter la vitesse de descente, augmenter la quantité de filetage de la tige de déblocage dans le joint à épaulement.
5. Pour diminuer la vitesse de descente, diminuer la quantité de filetage de la tige de déblocage dans le joint à épaulement.
6. Inverser les étapes 1 à 3 pour la réinstallation.
7. S'assurer du fonctionnement correct du produit avant de le remettre en service.

Remarque - Si le joint à épaulement est vissé trop loin sur la tige de déblocage, le clapet de déblocage se déclenchera et le vérin dérivera.

Remplacement de la pédale de déblocage, côté pieds (système hydraulique à trois côtés)

Outils requis :

- Tendeurs élastiques
- Pince à becs fins

Procédure :

1. Enclencher le frein. Pousser le produit pour vérifier que le frein est verrouillé.
2. Soulever le capot de la base et soutenir le capot à l'aide de tendeurs élastiques.
3. Déconnecter les ressorts de retour de la pédale de déblocage (C) des pédales de déblocage du côté pieds (Figure 11).

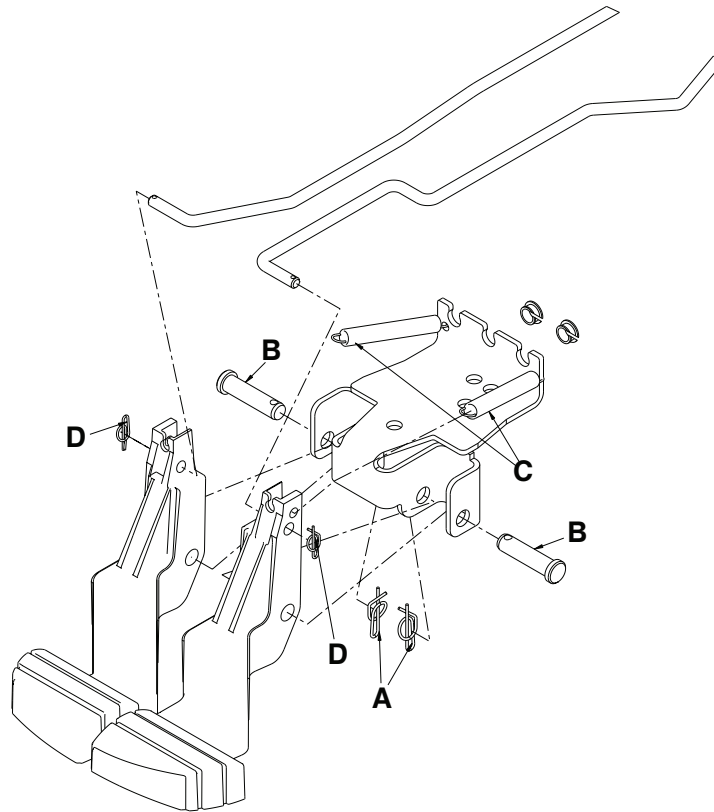


Figure 11 – Remplacer la pédale de déblocage

4. À l'aide d'une pince à becs fins, retirer les goupilles bêta (A) et les axes à épaulement (B) qui raccordent les pédales de déblocage du côté pieds au support de montage.
5. Tourner les pédales vers le haut.
6. À l'aide d'une pince à becs fins, retirer les goupilles bêta (D) qui fixent les tiges de déblocage du côté tête et du côté pieds aux pédales de déblocage du côté pieds.
7. Inverser les étapes pour installer les pédales fournies.
8. S'assurer du fonctionnement correct du produit avant de le remettre en service.

Remplacement de la tige de la pédale de déblocage, côté pieds (système hydraulique à trois côtés)

Outils requis :

- Pince à becs fins
- Tendeurs élastiques

Procédure :

1. Soulever le capot de la base et soutenir le capot à l'aide de tendeurs élastiques.
2. Retirer la pédale de déblocage du côté pieds (voir *Remplacement de la pédale de déblocage, côté pieds (système hydraulique à trois côtés)* (page 19)).
3. Retirer les Nyliners encliquetables qui maintiennent les tiges de déblocage de la pédale côté pieds au support de montage de la pédale.
4. Désenclencher les tiges de déblocage de la pédale du côté pieds des supports de tige de déblocage en plastique blanc (A) (Figure 12).

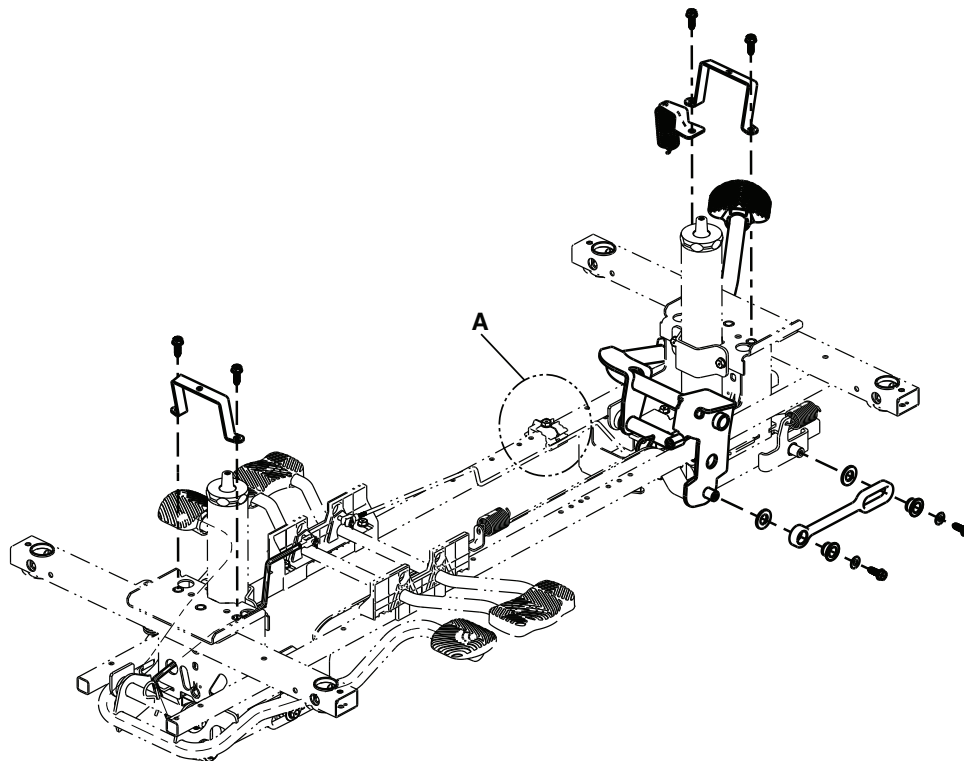


Figure 12 – Supports de tige de déblocage

5. Retirer les goupilles bêta (B) des goujons (C) sur l'ensemble soudé de la pédale de déblocage de la commande latérale Figure 13.

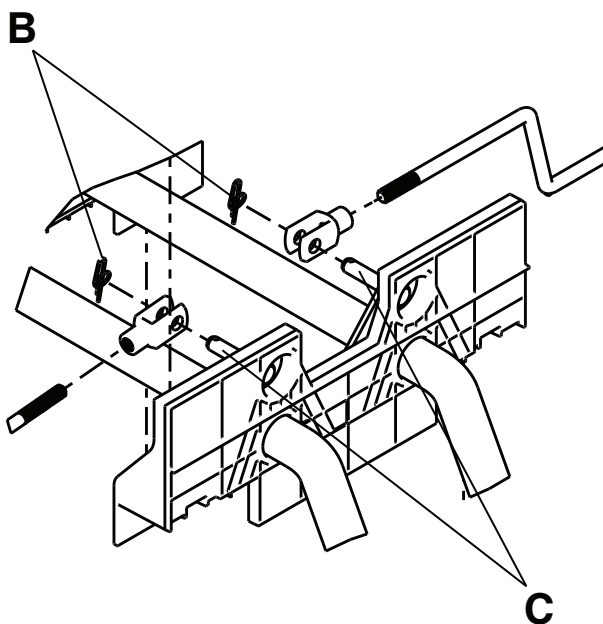


Figure 13 – Retirer les goupilles bêta des goujons

6. Retirer les tiges de déblocage de la pédale du côté pieds.
7. Inverser les étapes pour installer les tiges de pédale de déblocage fournies.
8. S'assurer du fonctionnement correct du produit avant de le remettre en service.

Retrait du haut du plan de couchage

Outils requis :

- Douille de 1/2 po
- Extension de clé de 3/8 po
- Clé à cliquet de 3/8 po
- Clé dynamométrique de 3/8 po (pi-lb)
- Boulon de 7/16-20, à filetage fin

Procédure :

1. Enclencher le frein. Pousser le produit pour vérifier que le frein est verrouillé.
2. Élever le produit à la position maximale.
3. Élever le dossier du relève-buste.
4. Du côté tête et du côté pieds, à l'aide d'une douille de 1/2 po avec une extension de clé de 3/8 po et une clé à cliquet de 3/8 po, retirer les deux vis à tête hexagonale à embase (A) qui fixent les tubes de support de vérin aux tiges de vérin (Figure 14).

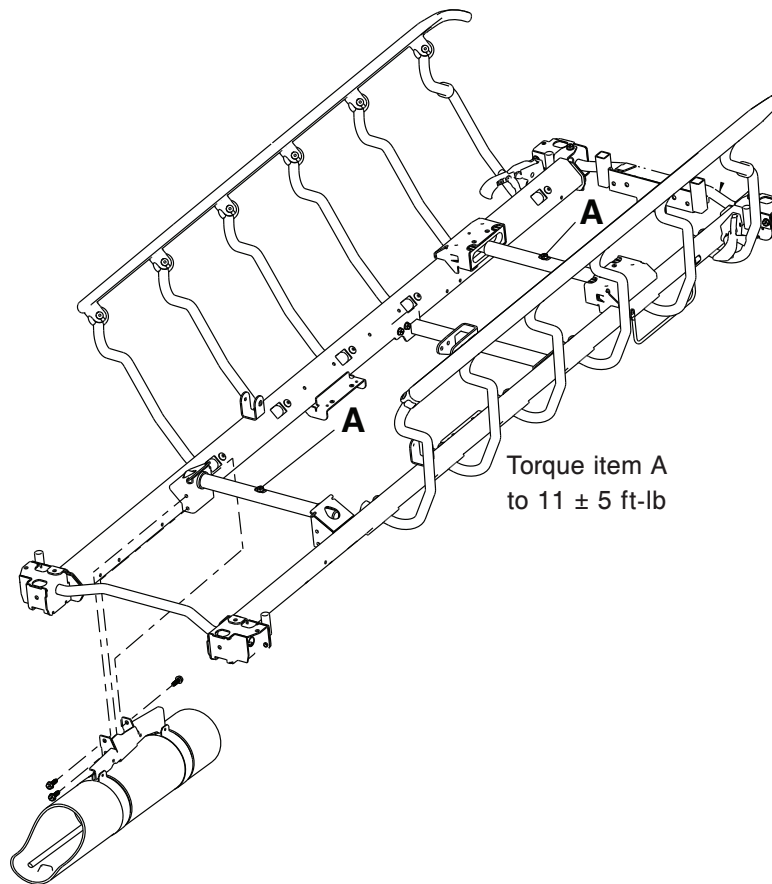


Figure 14 – Retrait du haut du plan de couchage

5. Insérer un boulon de 7/16-20 à filetage fin dans le haut des supports de vérin assez loin pour séparer le haut du plan de couchage de la tige de vérin.
6. Soulever le plan de couchage pour l'enlever des tiges de vérin et le mettre de côté.

Remarque - Deux intervenants sont nécessaires pour enlever le plan de couchage.

7. Inverser la procédure pour réinstaller. À l'aide d'une clé dynamométrique de 3/8 po, serrer les vis à tête hexagonale à embase de 11 ± 5 pi-lb ($15 \pm 6,8$ Nm).

8. S'assurer du fonctionnement correct du produit avant de le remettre en service.

Réglage du verrou de la barrière

AVERTISSEMENT - Toujours suivre la procédure de réglage du verrou de la barrière s'il est nécessaire de régler les verrous de la barrière. Les verrous de la barrière sont pré-réglés en usine et ne nécessitent aucun réglage. Un réglage incorrect de la barrière peut entraîner des blessures chez le patient ou l'opérateur.

Outils requis :

- Clé à six pans de 1/8 po

Procédure :

1. À l'aide d'une clé à six pans de 1/8 po, ajuster la vis à six pans située sur l'ensemble de verrou à l'opposé du verrou.
2. Tourner la vis :
 - a. Dans le sens horaire pour serrer le mécanisme de verrouillage.
 - b. Dans le sens antihoraire pour desserrer le mécanisme de verrouillage.

Remarque - Lorsque la barrière est verrouillée dans la position de hauteur maximale, le mouvement de la barrière doit être d'environ 1/8 po à 3/16 po.

- Un mouvement excessif de la barrière, lorsque celle-ci est verrouillée dans la position de hauteur maximale, donne à la barrière l'impression d'être instable. Cela peut entraîner une usure prématurée du système de verrouillage.
 - Un mouvement insuffisant de la barrière, lorsque la barrière est verrouillée en position de hauteur maximale, obstruera le loquet et le loquet ne se verrouillera pas en place. Cela peut endommager le loquet ou blesser le patient ou l'opérateur.
3. S'assurer du fonctionnement correct du produit avant de le remettre en service.

Éliminer l'excès d'air du système hydraulique

Outils requis :

- Aucun

Procédure :

1. Élever le produit à la position de hauteur maximale.
2. Appuyer plusieurs fois sur la pédale de la pompe pour forcer l'air à travers le système.
3. S'assurer du fonctionnement correct du produit avant de le remettre en service.

Réglage du dossier pneumatique

Outils requis :

- Clé mixte de 1/2 po
- Clé à six pans de 5/32 po

Procédure :

1. Élever le dossier à 75 degrés ou plus.
2. À l'aide d'une clé mixte de 1/2 po, desserrer les écrous hexagonaux des bras d'actionneur à l'extrémité de la barre de commande.
3. Pour ajuster le dossier, utiliser une clé à six pans de 5/32 po pour tourner les vis à six pans :


- a. Si le dossier ne bouge pas, le tourner dans le sens antihoraire (1 à 2 tours).
 - b. Si le dossier ne maintient pas sa position, tourner dans le sens horaire (1 à 2 tours).
4. À l'aide d'une clé mixte de 1/2 po, serrer les écrous hexagonaux. Élever le dossier de la position à plat à 90 degrés, puis abaisser le dossier jusqu'à ce qu'il soit à nouveau à plat.


Remarque - Appliquer du poids sur le dossier lorsqu'il est relevé pour s'assurer qu'il maintient sa position avec le poids appliqué.

5. S'assurer du fonctionnement correct du produit avant de le remettre en service.

Ensemble de frein standard

1105-003-205 rév. AB (référence uniquement)

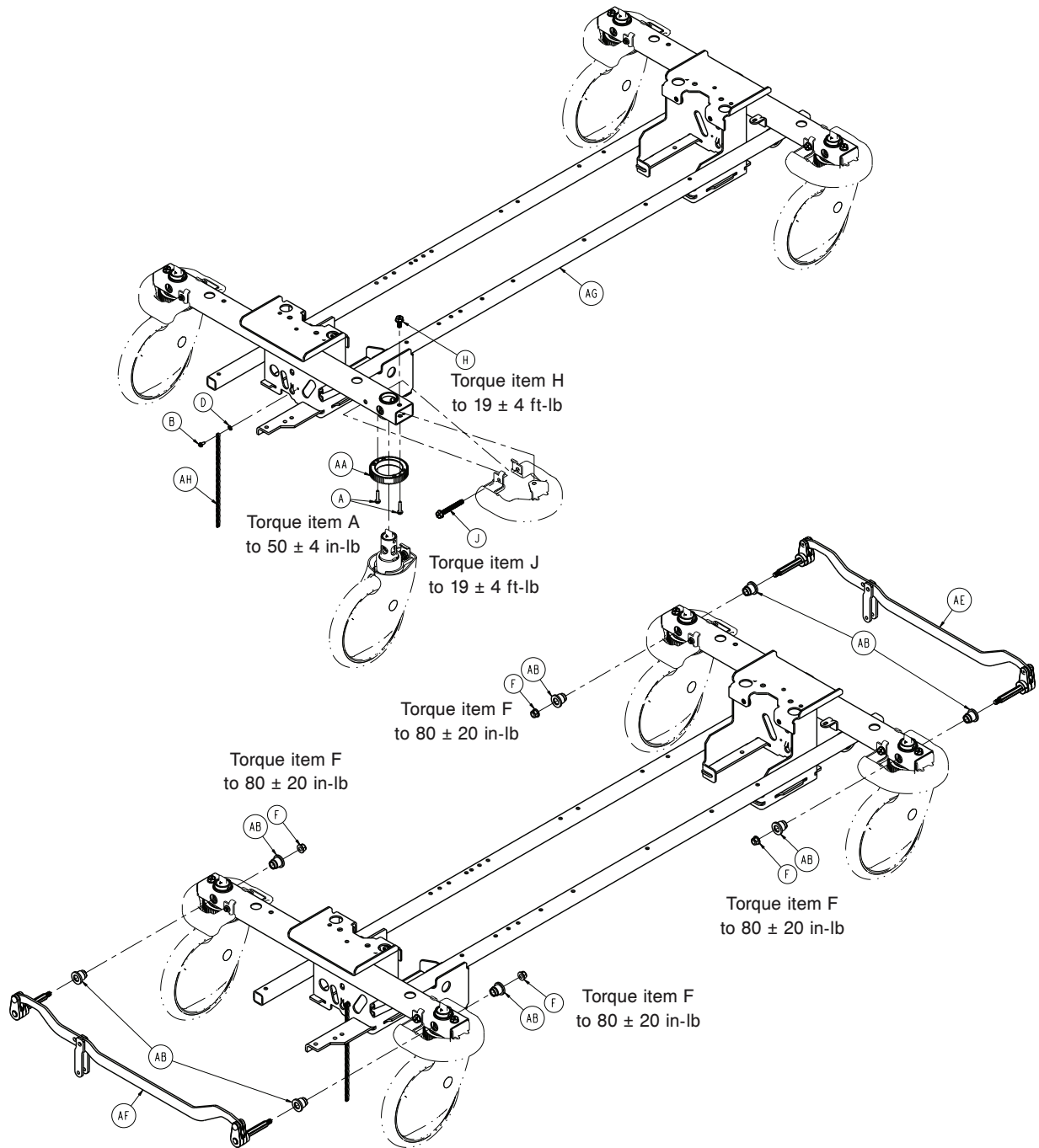

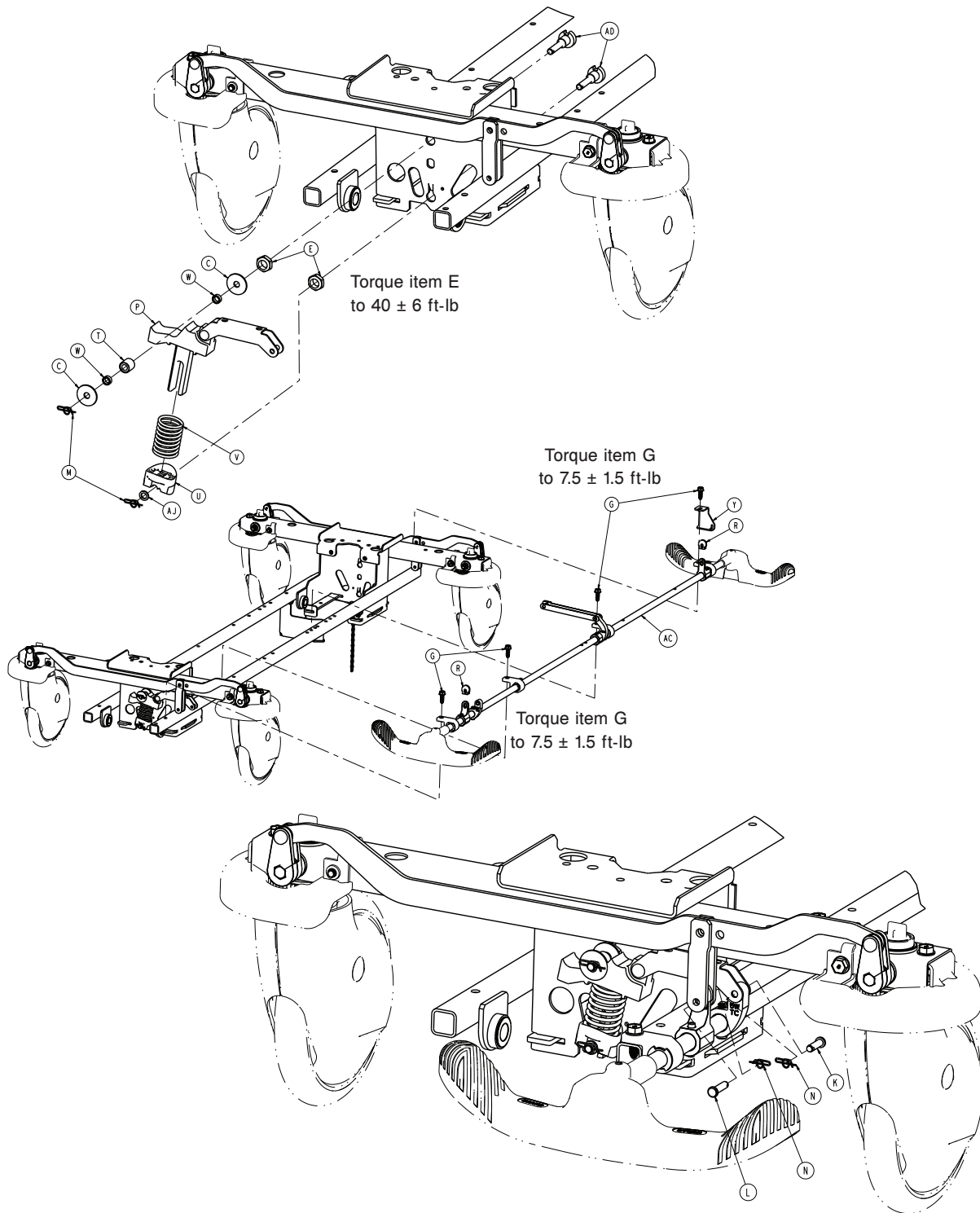


Élément	Numéro	Nom	Quantité
A	0003-147-000	Vis à tête hexagonale à embase	8
B	0023-071-000	Vis de taraudage à tête hexagonale, sans fente	1
C	0011-263-000	Rondelle	2
D	0013-018-000	Rondelle à denture externe	1
E	0016-049-000	Écrou hexagonal Nylock	2

Élément	Numéro	Nom	Quantité
F	0016-135-000	Écrou hexagonal à bride en Nylock	4
G	0023-288-000	Vis à tête hexagonale à embase	4
H	0023-330-000	Vis à tête hexagonale à embase	4
J	0023-331-000	Vis à tête hexagonale à embase	4
K	0026-295-000	Axe à épaulement	1
L	0026-393-000	Axe à épaulement	2
M	0027-019-000	Goupille bêta	2
N	0027-020-000	Goupille bêta	3
P	0853-003-035	Ensemble de la came de frein et de la liaison	1
R	0853-003-064	Capuchon de manivelle de tige de frein	2
T	0853-003-075	Ensemble de roulement à came de synchronisation	1
U	0853-003-103	Dispositif de retenue du ressort à came de synchronisation	1
V	0853-003-104	Ressort à came de synchronisation pour cinquième roue	1
W	0853-003-131	Entretoise à came de minutage	2
Y	1105-005-087	Crochet à ressort de retour	1
AA	0853-102-003	Engrenage Steer-Lock des roulettes	4
AB	0853-102-004	Roulement à collerette étagée	8
AC	0853-203-201	<i>Ensemble tige de frein (page 28)</i>	1
AD	0853-203-230	Support de pivot de roulement	2
AE	0853-303-010	Ensemble de maillon de frein, côté tête	1
AF	0853-303-020	Ensemble de maillon de frein, côté pieds	1
AG	0853-401-001	Ensemble soudé de la base	1
AH	3001-200-052	Chaîne de mise à la terre	1
AJ	0014-003-000	Rondelle	1

Ensemble tige de frein

0853-203-201 rév. AA (référence uniquement)

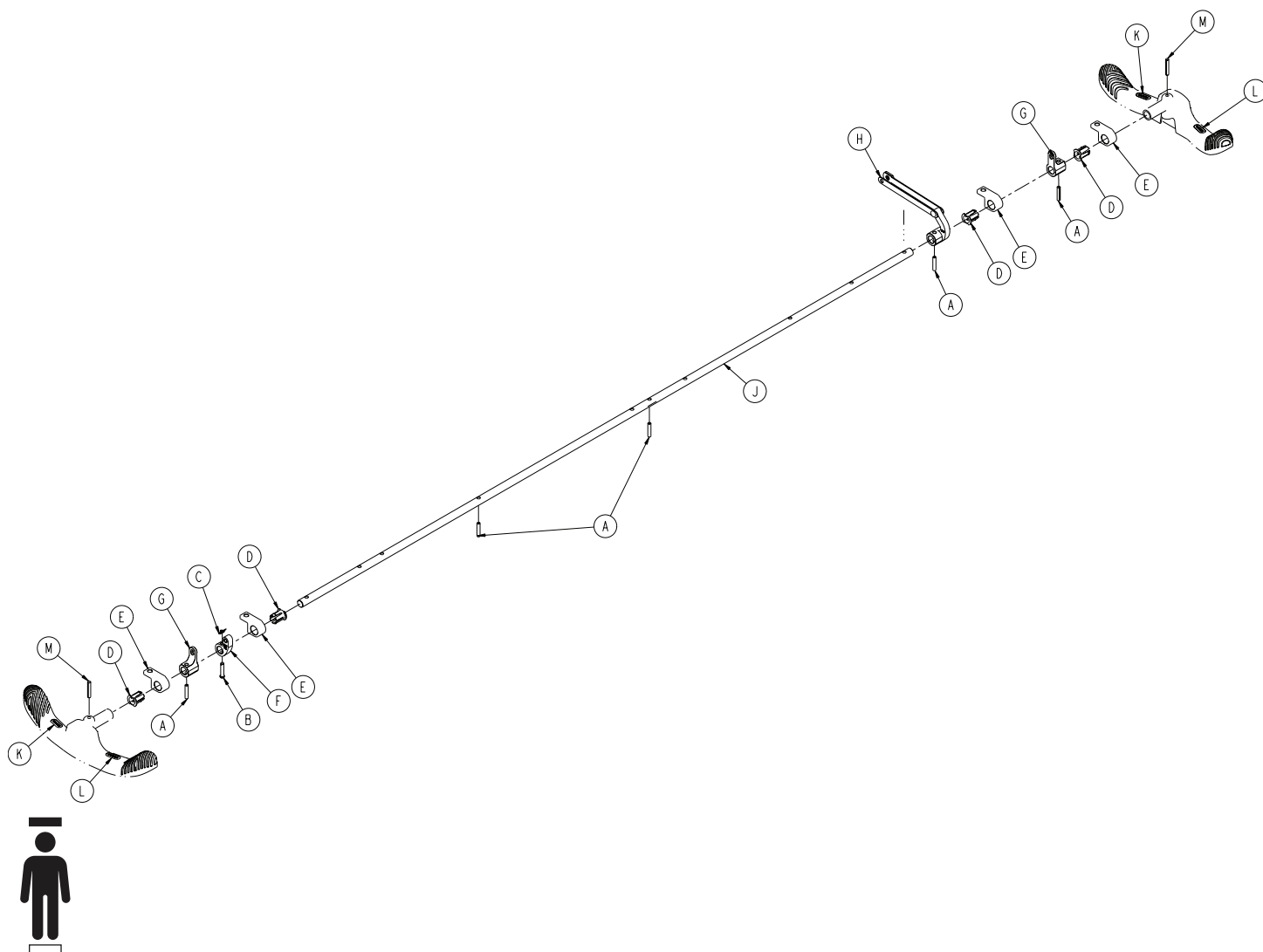


Élément	Numéro	Nom	Quantité
A	0026-014-000	Goupille élastique fendue	5
B	0026-251-000	Axe à épaulement	1
C	0027-020-000	Goupille bêta	1
D	0753-003-015	Tige de frein Nyliner	4
E	0853-003-004	Support de tige de frein	4
F	0853-003-055	Ensemble came de synchronisation de la cinquième roue	1
G	0853-203-011	Manivelle d'activation du frein	2
H	0853-206-135	Ensemble de liaison d'entraînement pour cinquième roue	1
J	0853-303-014	Tige de frein	1

Élément	Numéro	Nom	Quantité
K	1105-001-335	Étiquette, frein	2
L	1105-001-336	Étiquette, direction	2
M	0026-342-000	Broche rainurée	2

Ensemble de maillon d'entraînement de la cinquième roue


0853-206-135 Rév. E (référence uniquement)

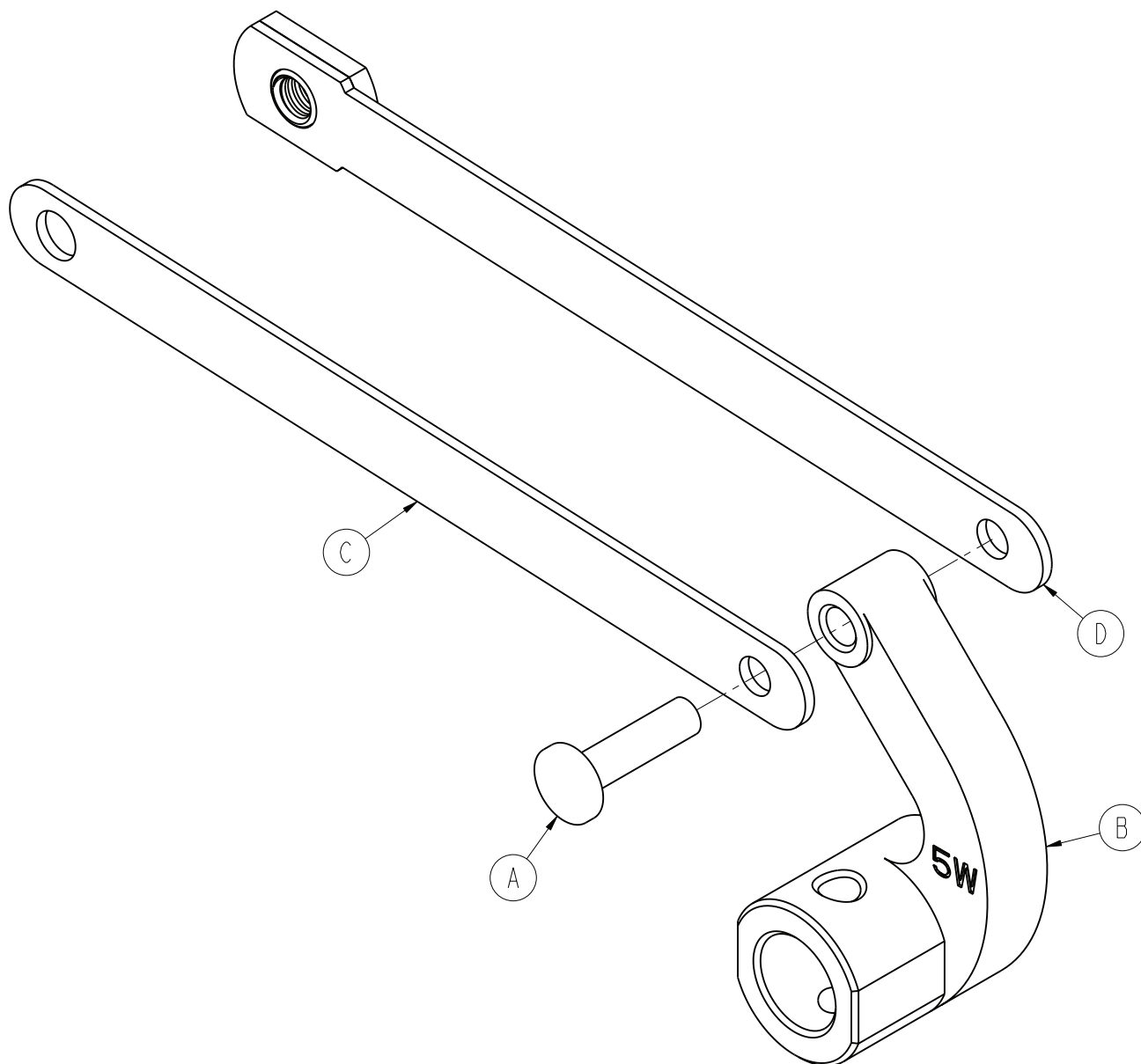




Élément	Numéro	Nom	Quantité
A	0753-003-098	Rivet semi-tubulaire	1
B	0853-206-011	Maillon d'entraînement de la tige de frein	1
C	0853-206-022	Maillon d'entraînement de la came de la cinquième roue	1
D	0853-206-047	Maillon d'entraînement de la came de la cinquième roue	1

Ensemble de frein à commande latérale

1105-003-220 rév. AB (référence uniquement)

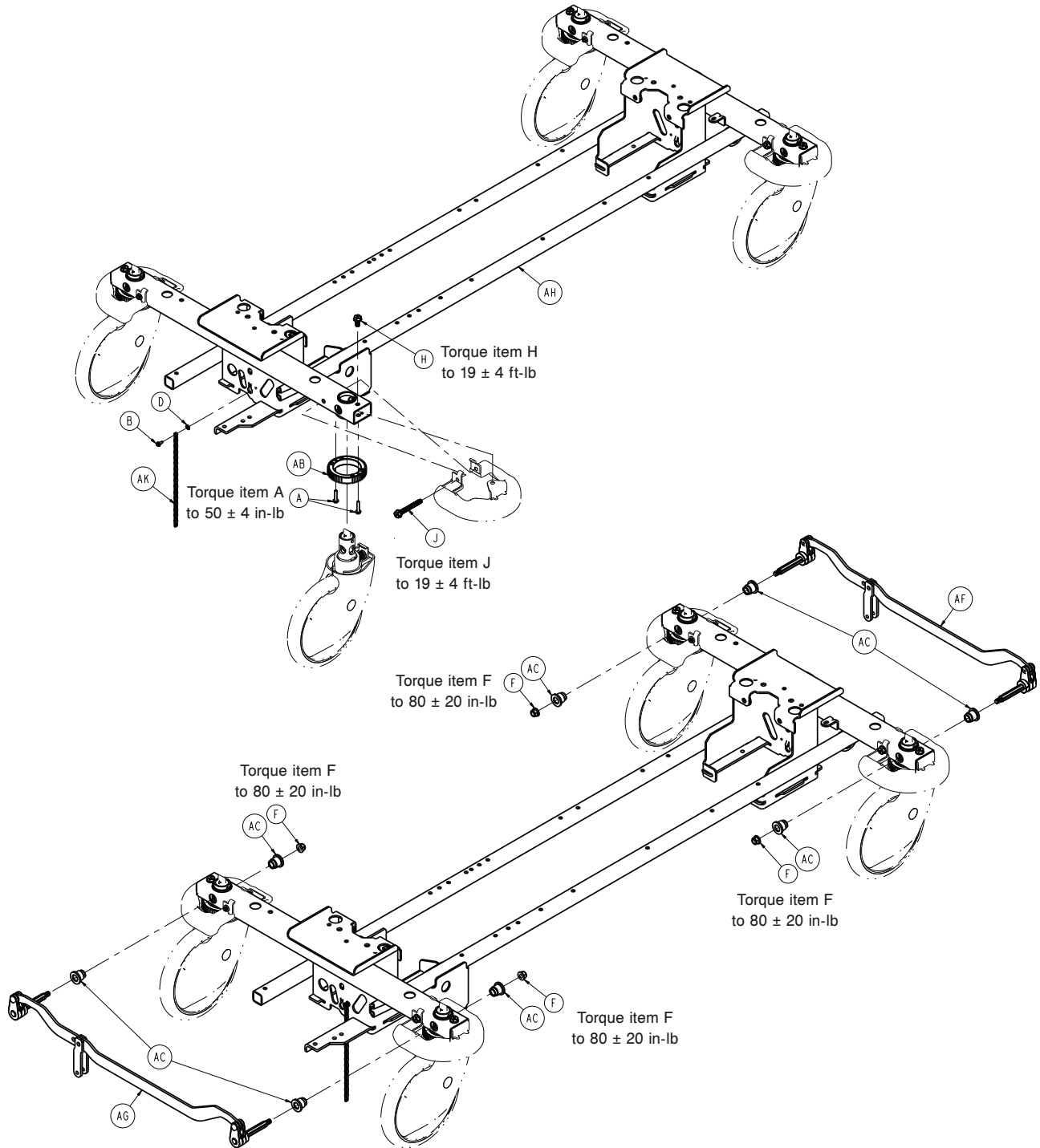

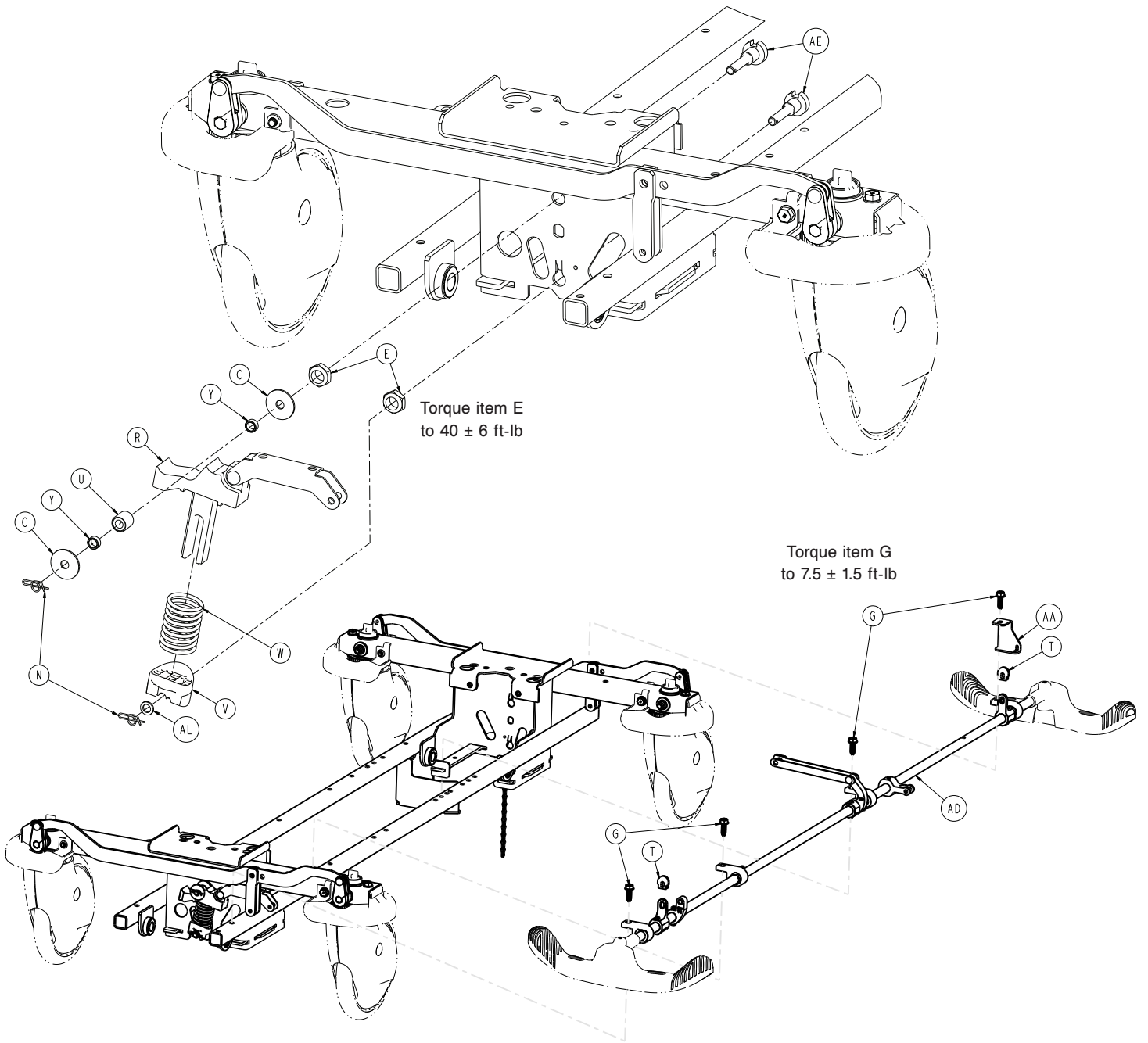

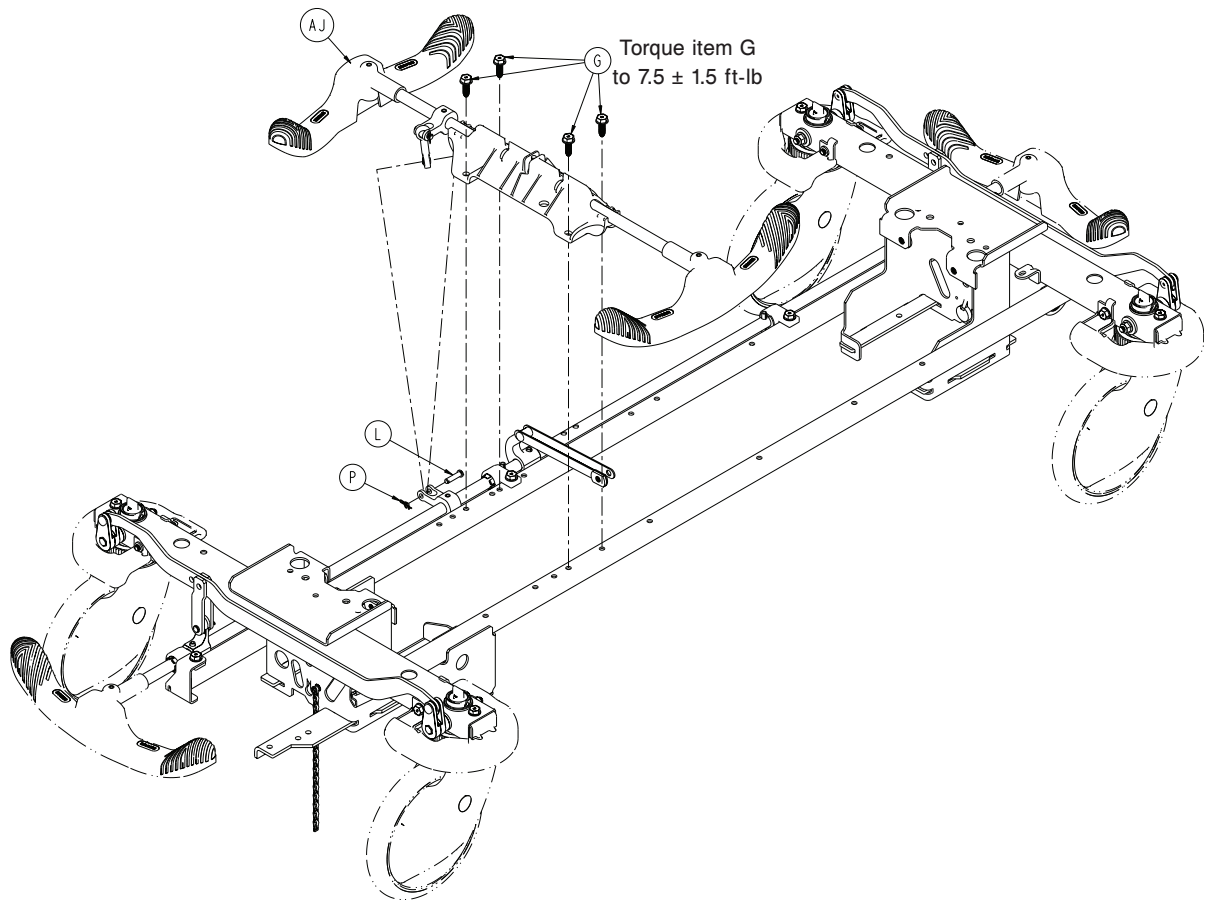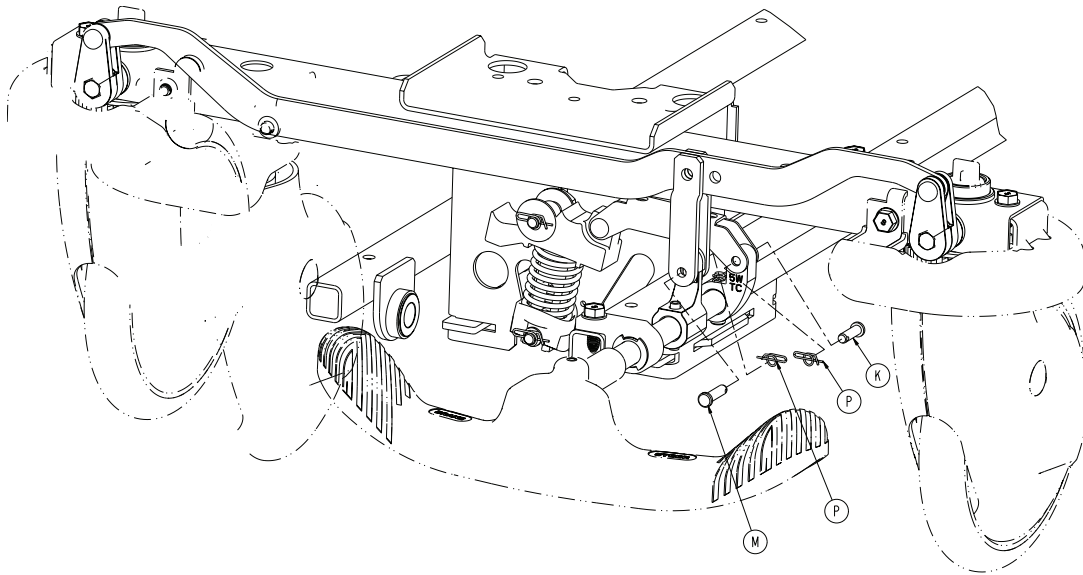


Élément	Numéro	Nom	Quantité
A	0003-147-000	Vis à tête hexagonale à embase	8
B	0023-071-000	Vis de taraudage à tête hexagonale, sans fente	1
C	0011-263-000	Rondelle	2
D	0013-018-000	Rondelle à denture externe	1
E	0016-049-000	Écrou hexagonal Nylock	2

Élément	Numéro	Nom	Quantité
F	0016-135-000	Écrou hexagonal à bride en Nylock	4
G	0023-288-000	Vis à tête hexagonale à embase	8
H	0023-330-000	Vis à tête hexagonale à embase	4
J	0023-331-000	Vis à tête hexagonale à embase	4
K	0026-295-000	Axe à épaulement	1
L	0026-340-000	Axe à épaulement	1
M	0026-393-000	Axe à épaulement	2
N	0027-019-000	Goupille bêta	2
P	0027-020-000	Goupille bêta	4
R	0853-003-035	Ensemble de la came de frein et de la liaison	1
T	0853-003-064	Capuchon de manivelle de tige de frein	2
U	0853-003-075	Ensemble de roulement à came de synchronisation	1
V	0853-003-103	Dispositif de retenue du ressort à came de synchronisation	1
W	0853-003-104	Ressort à came de synchronisation pour cinquième roue	1
Y	0853-003-131	Entretoise à came de minutage	2
AA	1105-005-087	Crochet à ressort de retour	1
AB	0853-102-003	Engrenage Steer-Lock des roulettes	4
AC	0853-102-004	Roulement à collerette étagée	8
AD	0853-203-225	<i>Ensemble tige de frein/commande latérale (page 35)</i>	1
AE	0853-203-230	Support de pivot de roulement	2
AF	0853-303-010	Ensemble de maillon de frein, côté tête	1
AG	0853-303-020	Ensemble de maillon de frein, côté pieds	1
AH	0853-401-001	Ensemble soudé de la base	1
AJ	1105-003-210	<i>Ensemble de frein à commande latérale (page 37)</i>	1
AK	3001-200-052	Chaîne de mise à la terre	1
AL	0014-003-000	Rondelle	1

Ensemble tige de frein/commande latérale

0853-203-225 rév. AA (référence uniquement)

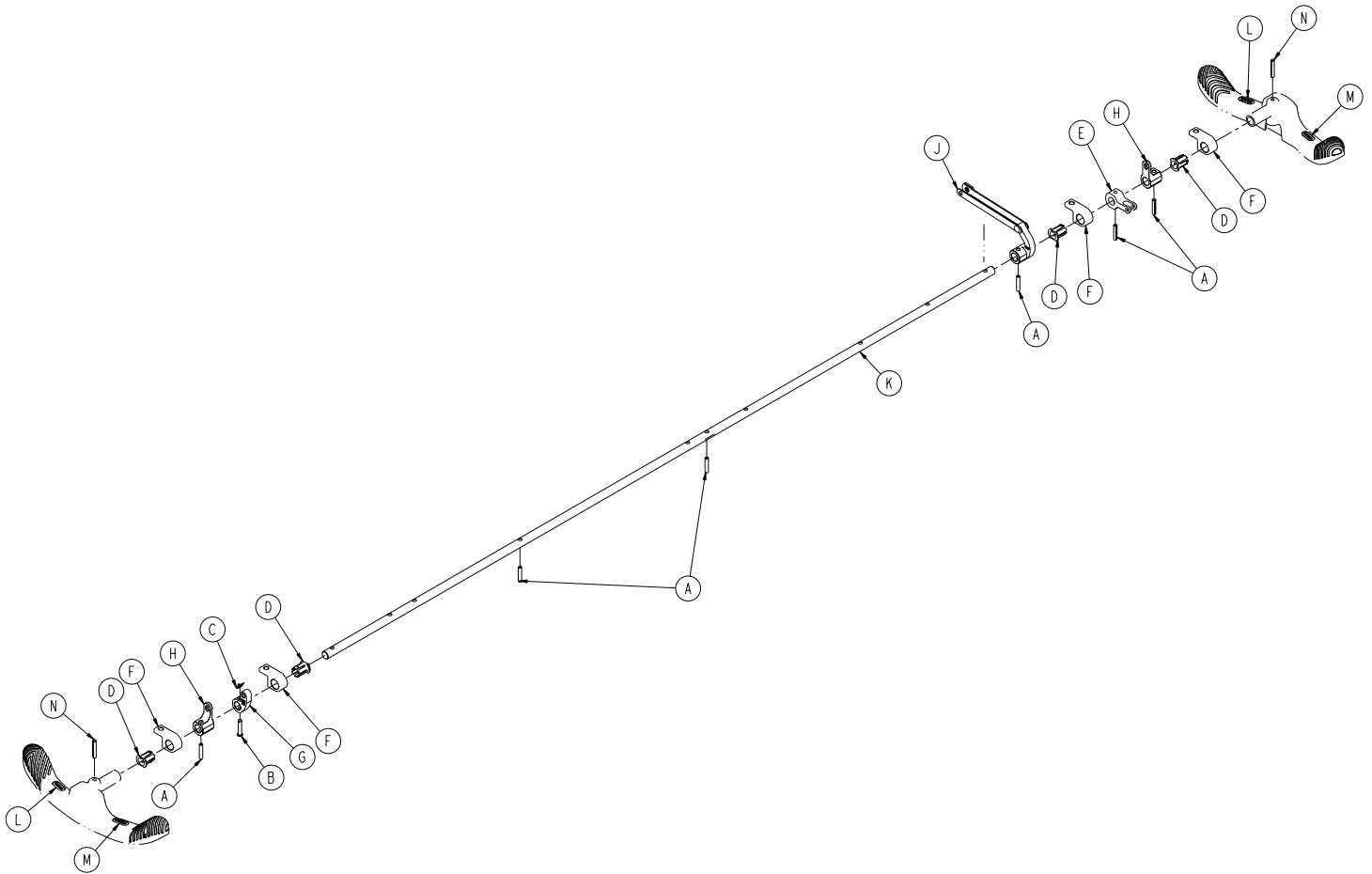


Élément	Numéro	Nom	Quantité
A	0026-014-000	Goupille élastique fendue	6
B	0026-251-000	Axe à épaulement	1
C	0027-020-000	Goupille bêta	1
D	0753-003-015	Tige de frein Nyliner	4
E	0753-003-112	Liaison de commande latérale	1
F	0853-003-004	Support de tige de frein	4
G	0853-003-055	Ensemble came de synchronisation de la cinquième roue	1
H	0853-203-011	Manivelle d'activation du frein	2
J	0853-206-135	Ensemble de liaison d'entraînement pour cinquième roue	1
K	0853-303-014	Tige de frein	1
L	1105-001-335	Étiquette, frein	2

Élément	Numéro	Nom	Quantité
M	1105-001-336	Étiquette, direction	2
N	0026-342-000	Broche rainurée	2

Ensemble de frein à commande latérale


1105-003-210 rév. B (référence uniquement)

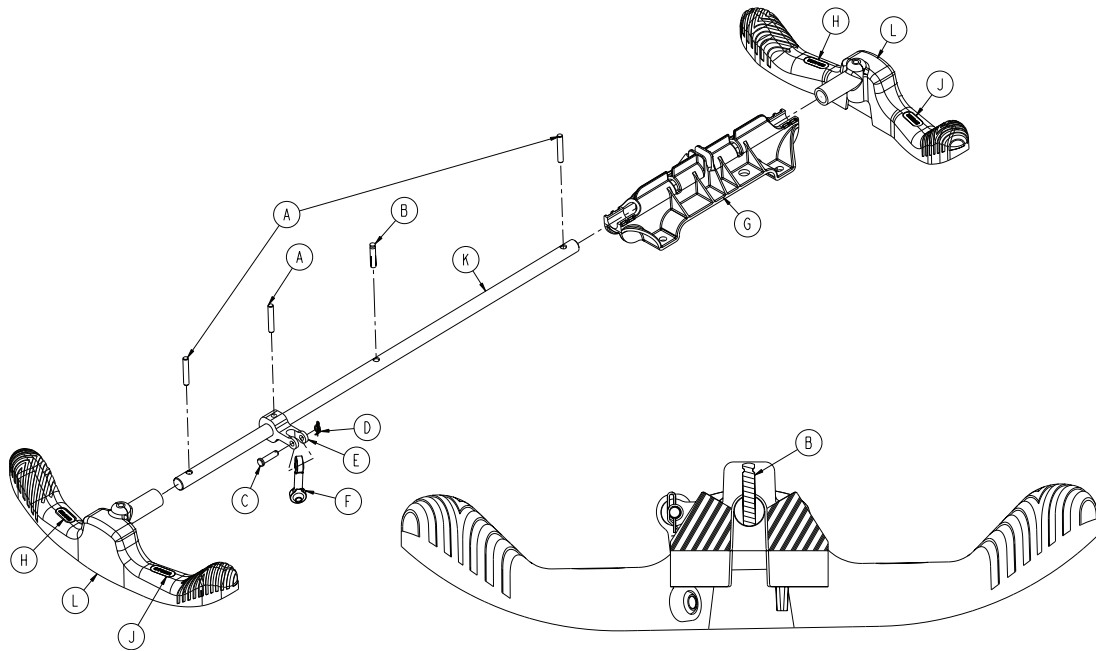

Élément	Numéro	Nom	Quantité
A	0026-342-000	Broche rainurée	3
B	0026-138-000	Broche rainurée	1
C	0026-340-000	Axe à épaulement	1
D	0027-020-000	Goupille bêta	1
E	0753-003-112	Liaison de commande latérale	1
F	0753-003-117	Liaison de l'extrémité de la tige	1
G	0853-003-214	Support latéral de la tige de commande	1
H	1105-001-335	Étiquette, frein	2
J	1105-001-336	Étiquette, direction	2
K	1105-003-319	Table des tiges de frein à commande latérale	1
L	1105-005-154	Pédale papillon « V »	2

Options de couleurs de pare-chocs

0853-003-085 rév. E (référence uniquement)

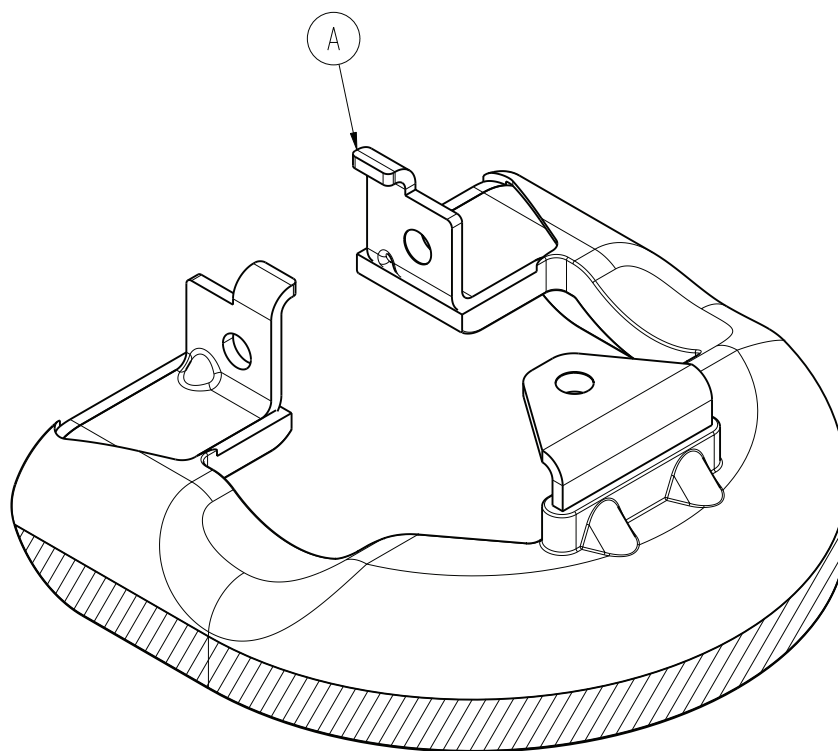


Élément	Numéro	Nom	Quantité
A	0853-003-082	Pare-chocs	1

Couleur du pare-chocs	Jeu de quatre	Quantité
Gris froid	1105-003-552	4
Rouge	1105-003-554	4
Bleu marine	1105-003-555	4

Ensemble de roulette de 8 po avec de couvercle complet - 0853-003-615

0853-503-020 rév. C (référence uniquement)

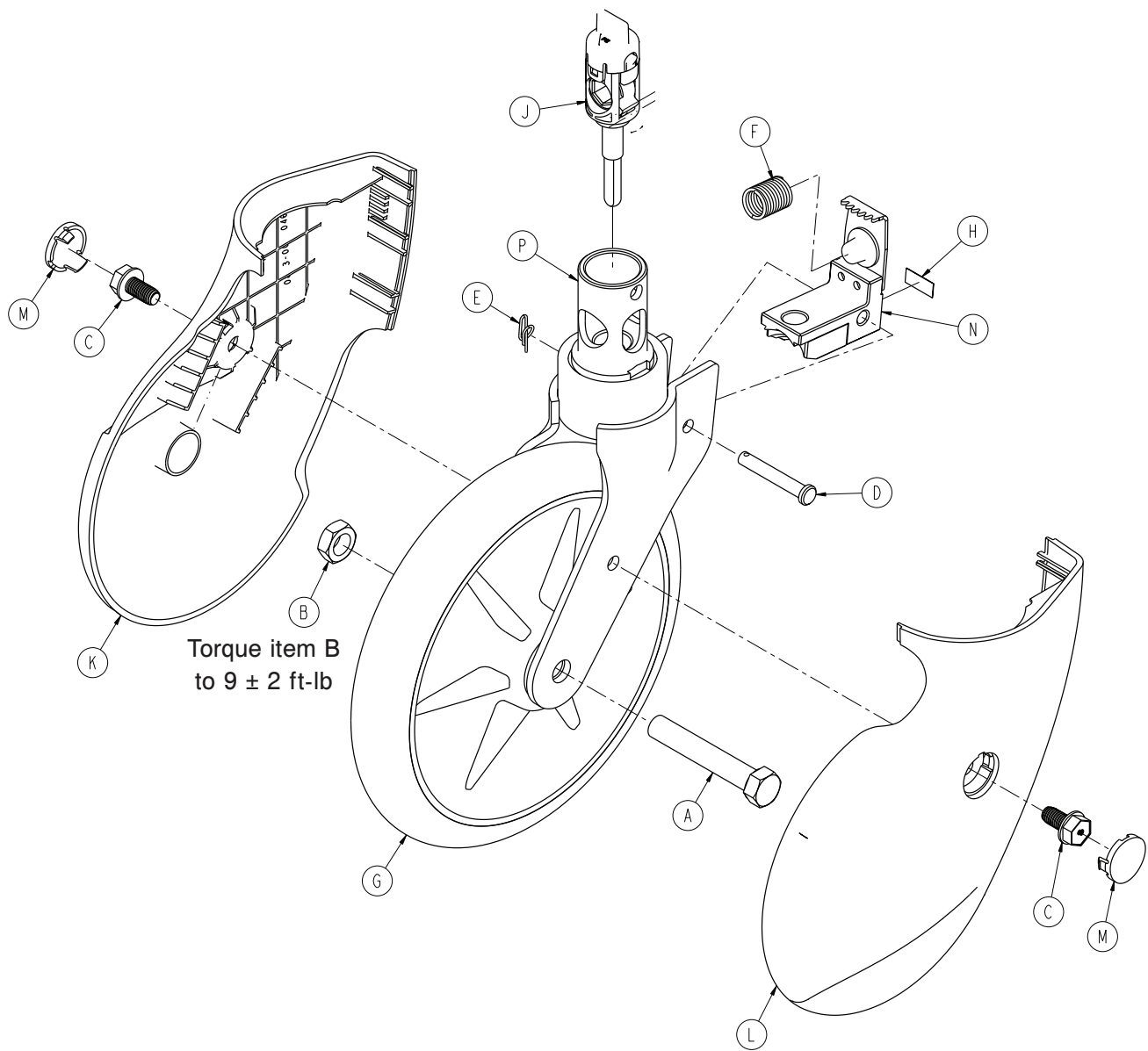


Élément	Numéro	Nom	Quantité
A	0003-099-000	Vis d'assemblage à tête hexagonale	1
B	0016-060-000	Contre-écrou hexagonal Toplock	1
C	0023-330-000	Vis à tête hexagonale à embase	2
D	0026-377-000	Axe à épaulement	1
E	0027-020-000	Goupille bêta	1
F	0038-596-000	Câble de compression	1
G	0753-103-215	Ensemble de roue moulée	1
H	0853-003-032	Étiquette, patin de frein des roulettes	1

Élément	Numéro	Nom	Quantité
J	0853-003-040	Boîtier de la came	1
K	0853-003-046	Couvercle de roulette, côté droit	1
L	0853-003-047	Couvercle de roulette, côté gauche	1
M	0853-003-048	Fiche du couvercle de la roulette	2
N	0853-203-030	Ensemble de patin de frein	1
P	0853-303-021	Ensemble de corne de roulette avec roulement	1

Ensemble de cinquième roue rétractable


1105-006-110 rév. AA (référence uniquement)

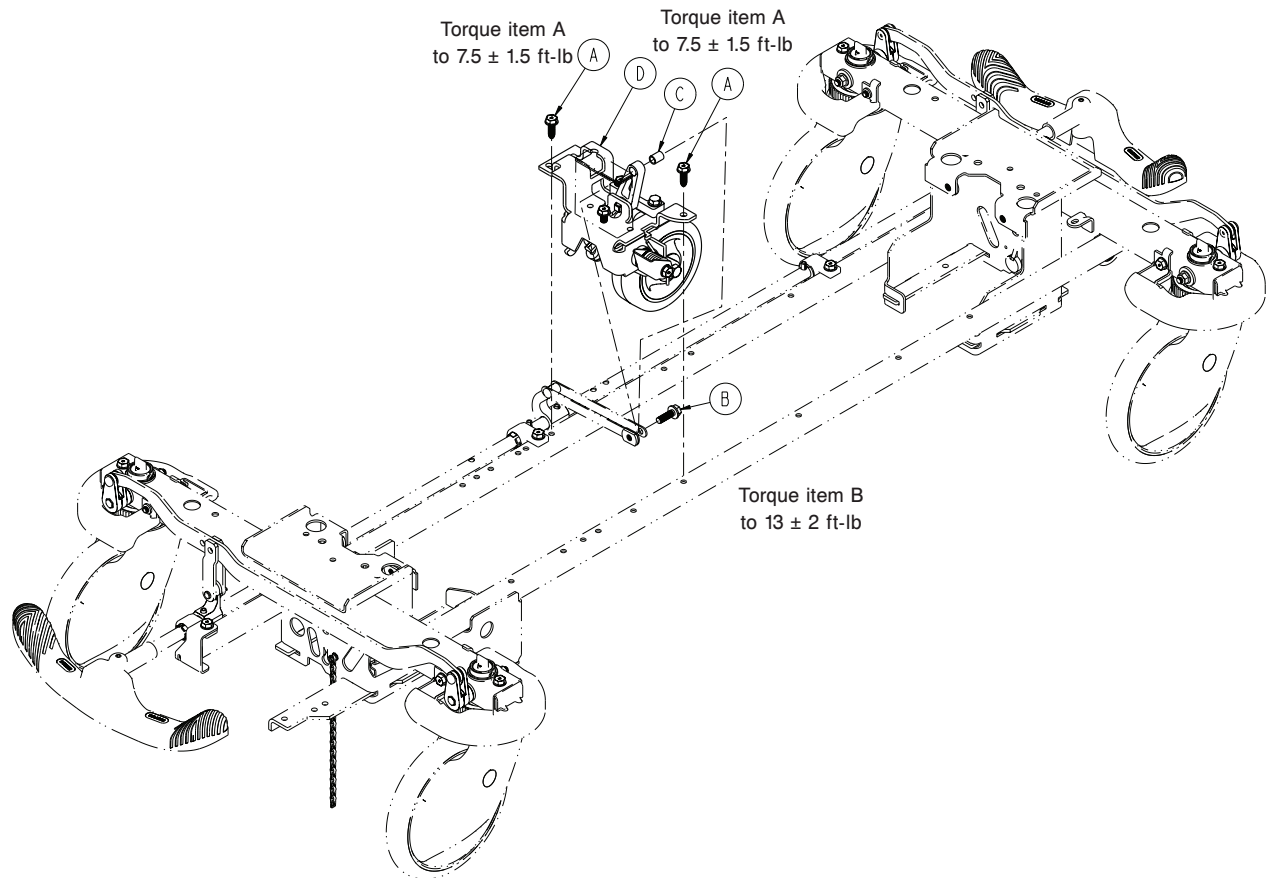

Élément	Numéro	Nom	Quantité
A	0023-288-000	Vis à tête hexagonale à embase	2
B	0023-305-000	Vis à tête hexagonale à embase	1
C	0753-006-148	Roulement à came	1
D	1105-006-130	Ensemble de cinquième roue - 1105-006-130 (page 43)	1

Vérins de descente non constante


0853-002-080 Rév. AA (référence uniquement)

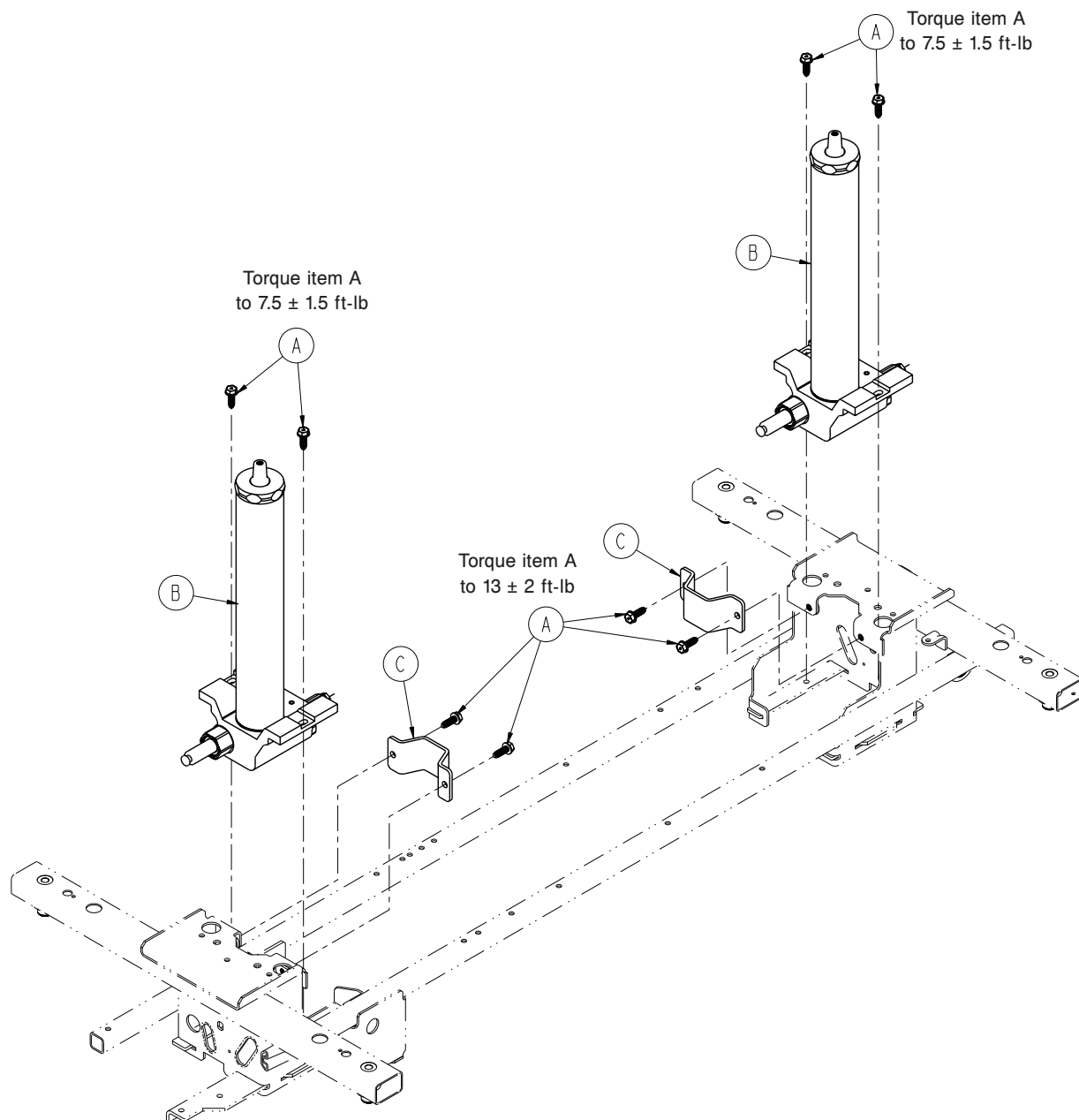

Élément	Numéro	Nom	Quantité
A	0023-288-000	Vis à tête hexagonale à embase	8
B	0753-002-070	Ensemble de vérin de descente non constante	2
C	0853-010-007	Pince du réservoir	2

Ensemble de cinquième roue - 1105-006-130

Rév. E (référence uniquement)

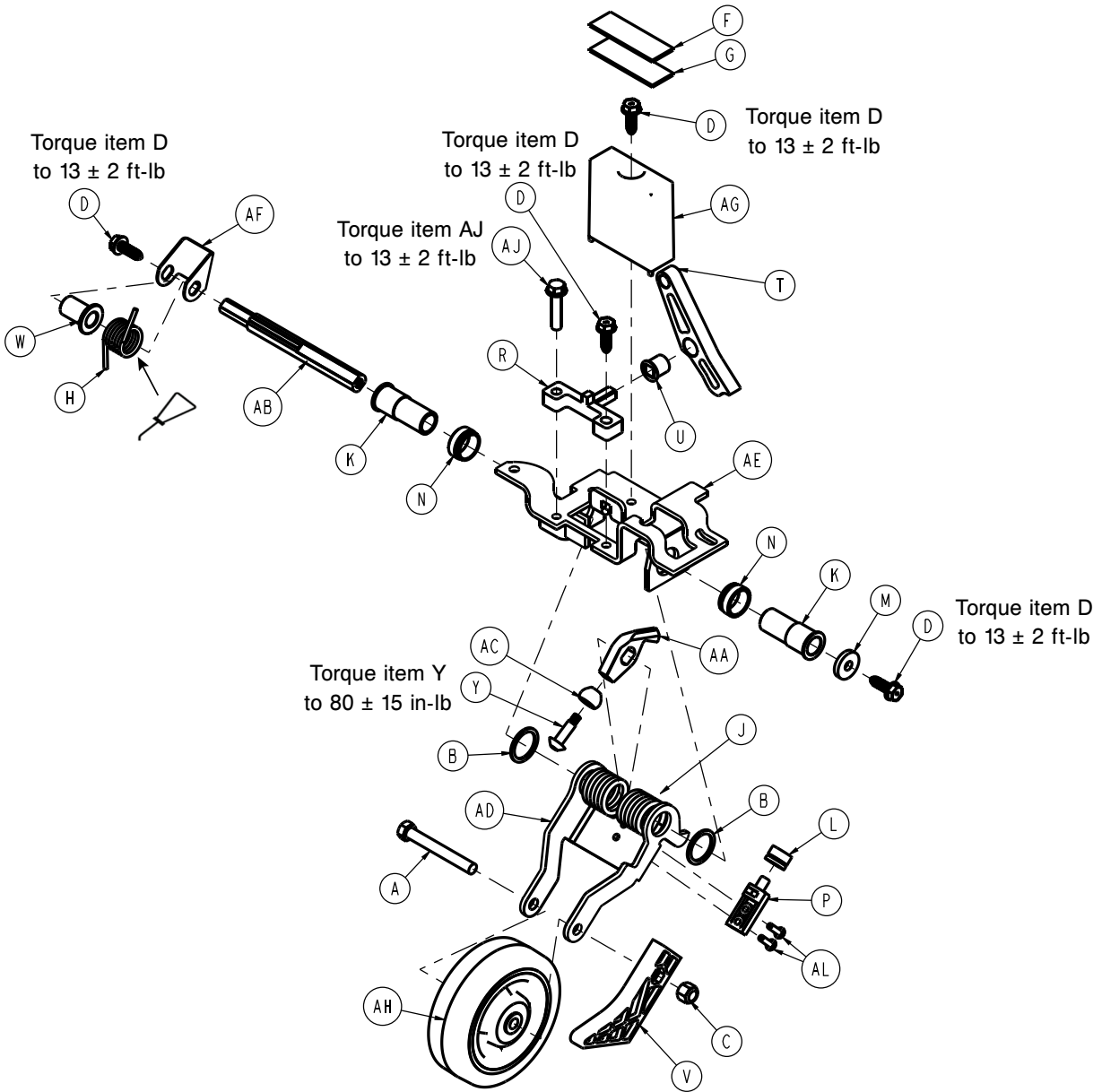



Élément	Numéro	Nom	Quantité
A	0003-083-000	Vis d'assemblage à tête hexagonale	1
B	0011-360-000	Rondelle	2
C	0016-035-000	Écrou hexagonal Nylock	1
D	0023-288-000	Vis à tête hexagonale à embase	4
F	0029-007-000	Double verrouillage	1
G	0029-009-000	Double verrouillage	1
H	0753-006-074	Ressort de torsion	1
J	0753-006-075	Ressort de torsion	1

Élément	Numéro	Nom	Quantité
K	0753-006-097	Roulement de l'arbre moteur	2
L	0753-006-106	Amortisseur	1
M	0753-006-108	Rondelle de butée	1
N	0753-006-115	Course de roulement	2
P	0753-006-120	Broche de montage du pare-chocs	1
R	0753-006-133	Bloc de pivotement de came	1
T	0753-006-142	Came cinquième roue	1
U	0753-006-143	Roulement à came	1
V	0753-006-149	Rampe de la cinquième roue	1
W	0753-006-152	Entretoise à ressort	1
Y	0753-006-153	Tige à rouleaux	1
AA	0753-006-198	Broche d'entraînement	1
AB	0753-006-223	Arbre d'entraînement	1
AC	0753-006-277	Rouleau	1
AD	1105-006-126	Support pour cinquième roue	1
AE	1105-006-131	Ensemble soudé de la cinquième roue	1
AF	0853-006-227	Crochet à ressort de retour	1
AG	0853-010-045	Dégagement du capot	1
AH	1210-001-147	Cinquième roue	1
AJ	0023-160-000	Vis à tête hexagonale à embase	1
AL	0025-270-000	Rivet	2

Ensemble hydraulique à deux côtés

1105-005-500 Rév. AA (référence uniquement)

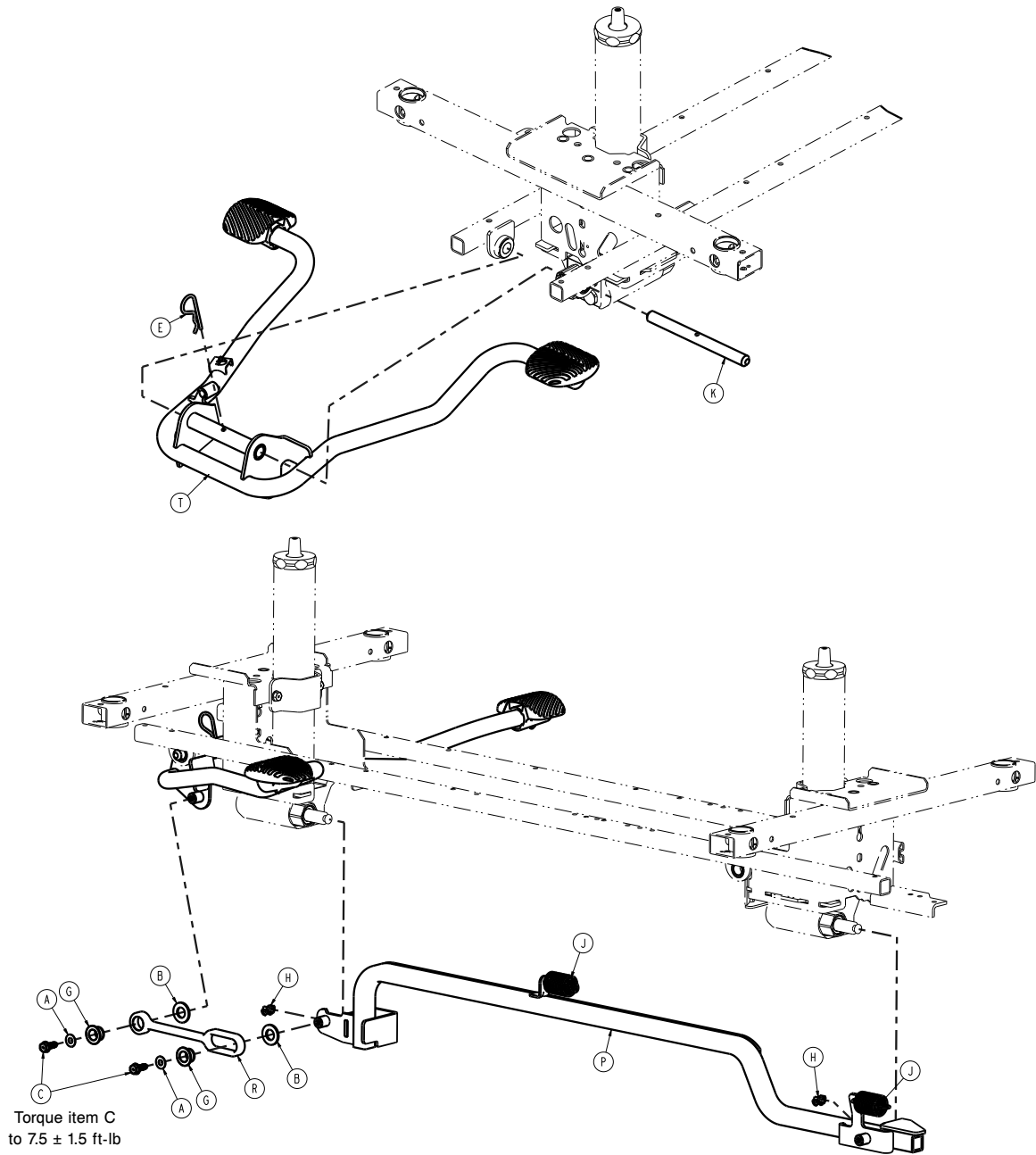

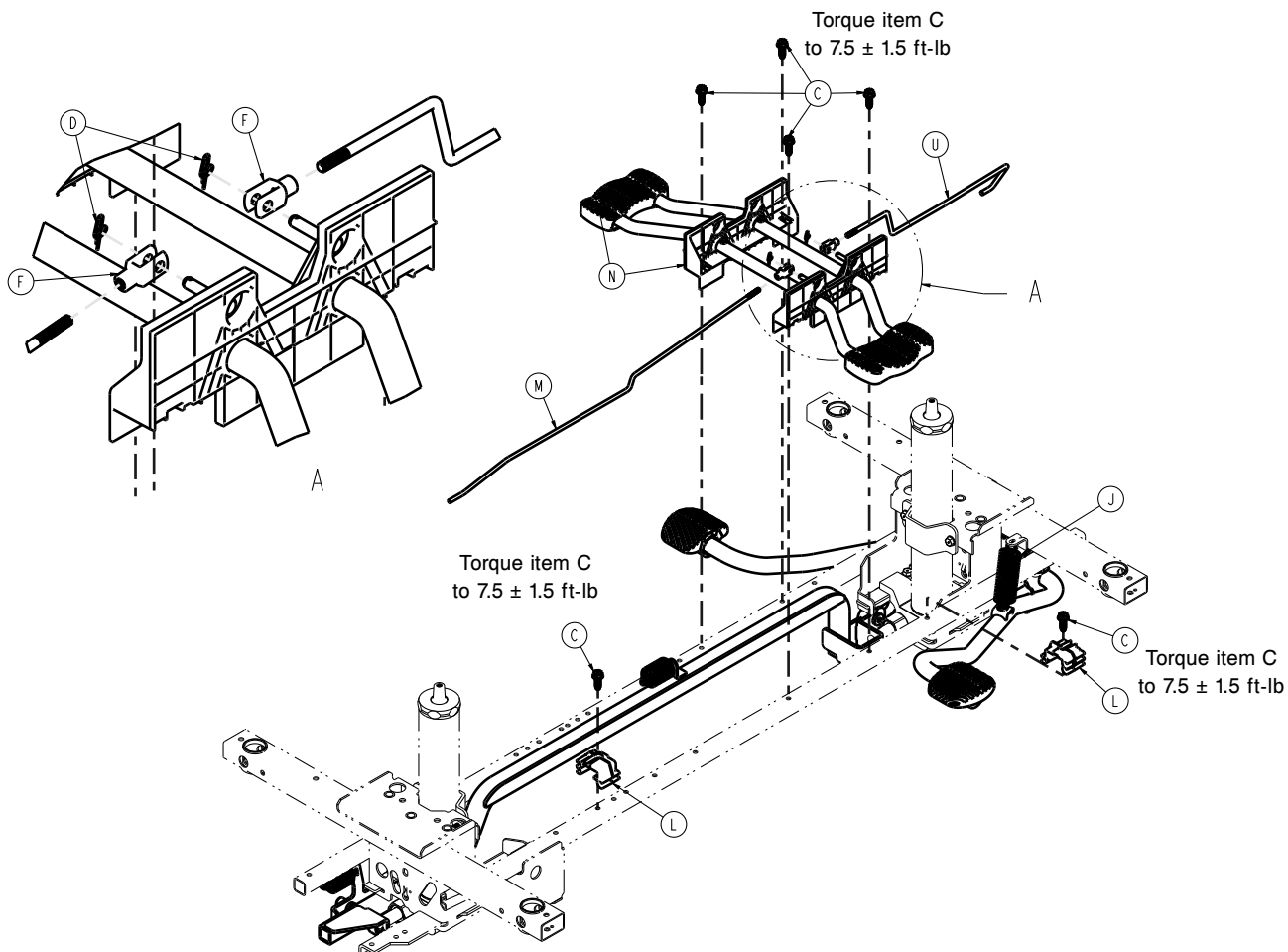


Élément	Numéro	Nom	Quantité
A	0011-023-000	Rondelle	2
B	0014-071-000	Rondelle	2
C	0023-288-000	Vis à tête hexagonale à embase	8
D	0027-020-000	Goupille bêta	2
E	0027-031-000	Goupille en épingle à cheveux	1
F	0052-909-000	Joint à épaulement	2
G	0753-005-044	Douille de la pédale de la pompe	2
H	0753-005-089	Bouchon du piston de la pompe	2
J	0853-005-009	Ressort de retour	3
K	0853-005-074	Broche pivotante	1
L	0853-010-215	Support de tige de libération	2
M	1105-004-015	Tige de déblocage, côté pieds	1
N	0853-004-251	Ensemble pédale d'abaissement	1
P	1105-005-035	Ensemble soudé du tube de connexion de pompe	1
R	1105-005-075	Maillon de la pédale de la pompe	1

Élément	Numéro	Nom	Quantité
T	1105-005-285	<i>Ensemble de pédale de pompe, côté tête - 1105-005-285 (page 49)</i>	1
U	0853-204-014	Tige de déblocage, côté tête	1

Ensemble de pédale d'abaissement - 1105-004-201


Rév. A (référence uniquement)

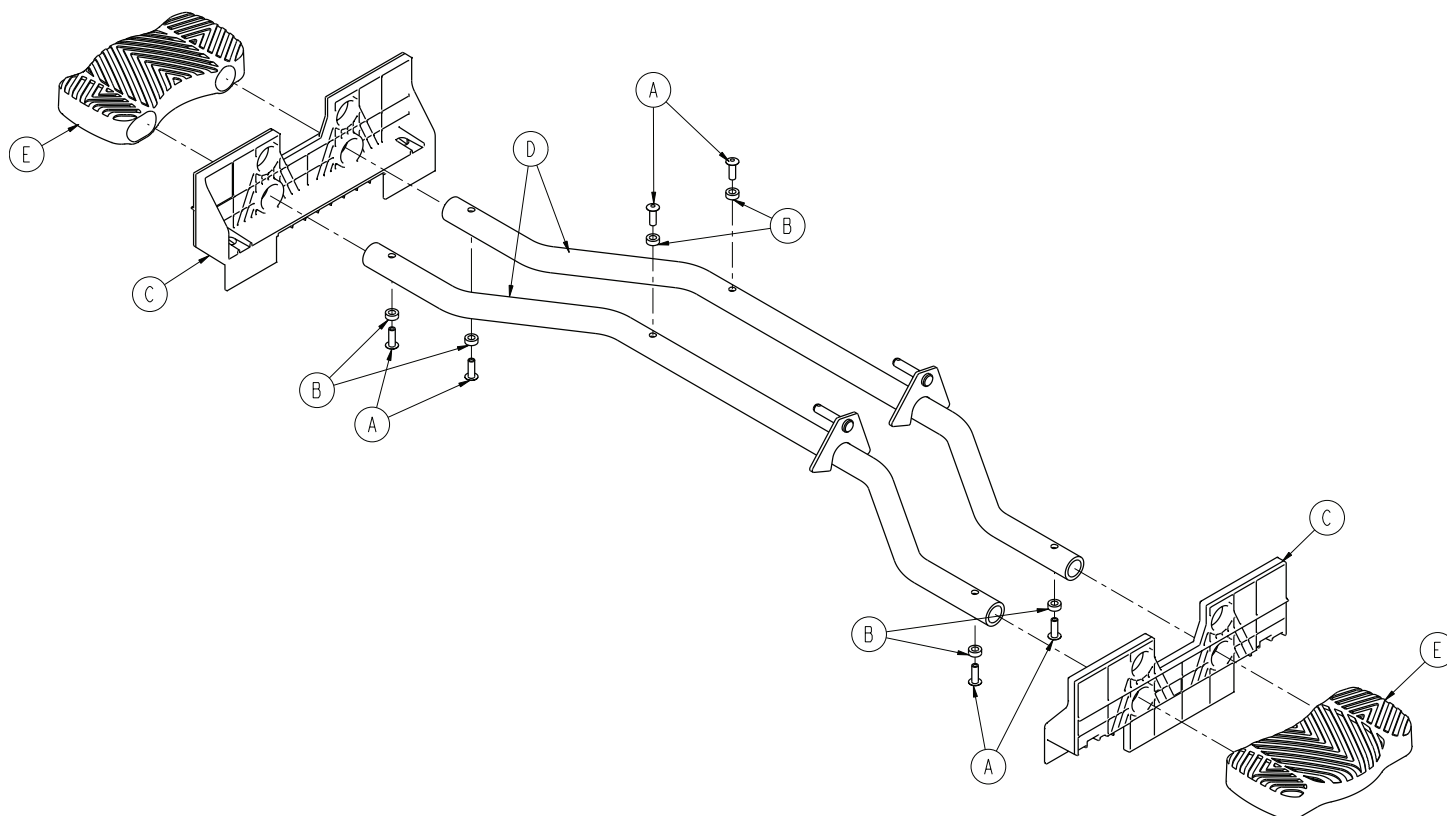

Élément	Numéro	Nom	Quantité
A	0025-133-000	Rivet à tête en dôme	6
B	0753-004-29	Distance du levier de débrayage	6
C	0853-004-320	Support du levier de débrayage	2
D	1105-004-004	Ensemble soudé de la pédale à libération	2
E	1105-201-127	Uni-pédale courte	2

Ensemble de pédale de pompe, côté tête - 1105-005-285


Rév. B (référence uniquement)

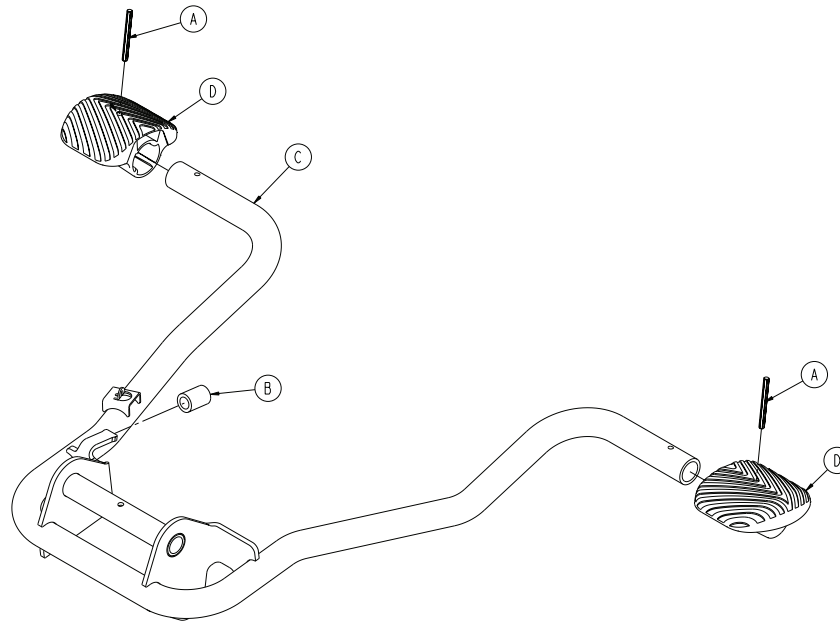

Élément	Numéro	Nom	Quantité
A	0026-343-000	Broche à rainure	2
B	0715-001-140	Tube en vinyle	1
C	1105-105-180	Ensemble soudé de la pédale de la pompe, côté tête	1
D	1105-201-126	Pédale de pompe	2

Ensemble d'étiquetage - capot standard

0747-010-100 Rév. B (référence uniquement)

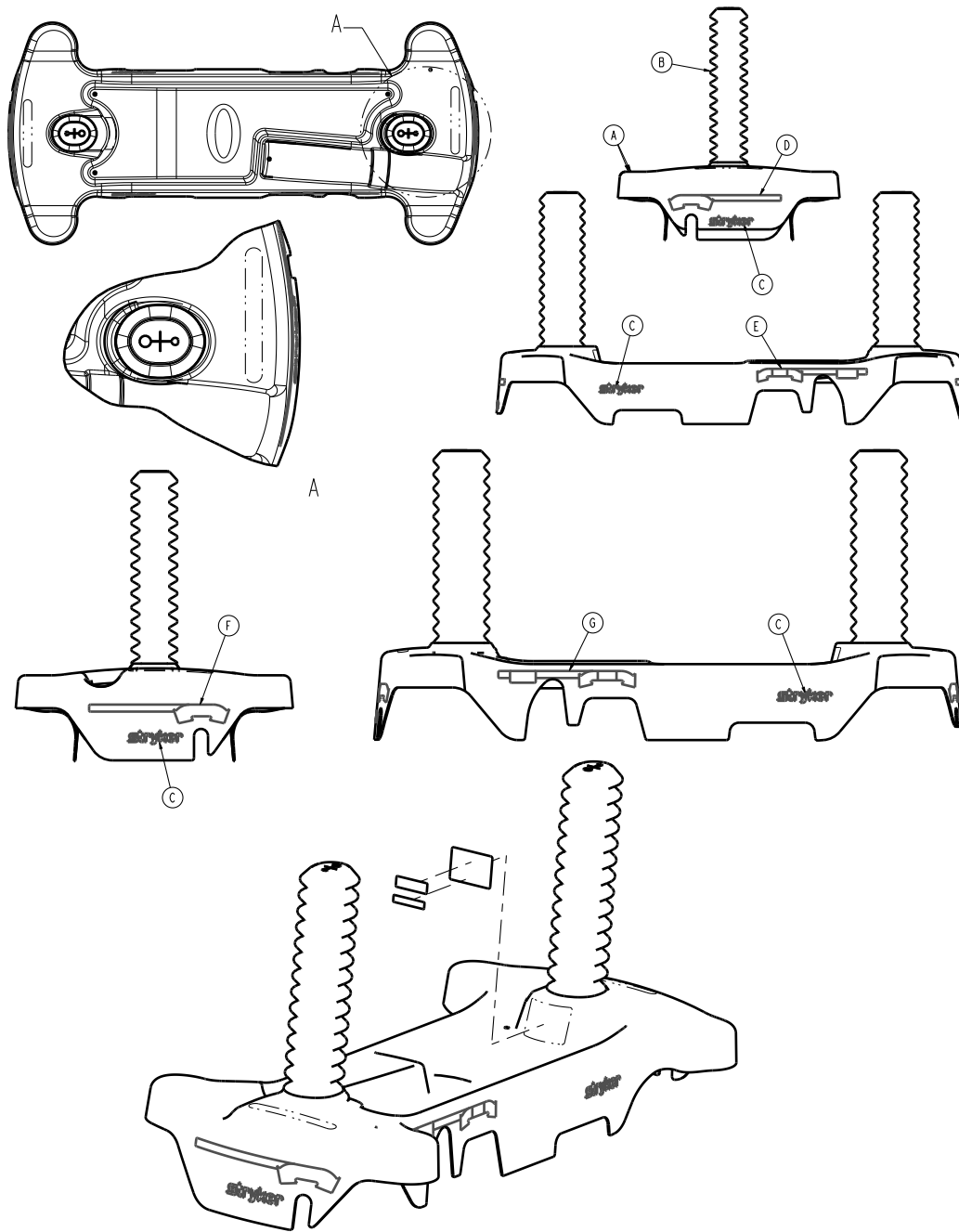


Élément	Numéro	Nom	Quantité
A	0747-001-035	Capot de la base	1
B	0747-010-134	Soufflets	2
C	0946-201-060	Étiquette, logo Stryker	4
D	0753-010-351	Étiquette, frein/guidage, côté pieds	1
E	0853-010-355	Étiquette, élévation-abaissement, gauche	1

Élément	Numéro	Nom	Quantité
F	0753-010-370	Étiquette, commande de frein/ guidage, côté tête	1
G	0853-010-354	Étiquette, élévation-abaissement, droite	1

Étiquettes du service	Numéro	Quantité
Urgence	1105-023-004	2
USPA	1105-023-007	2
Transport	1105-023-005	2
Chirurgie	1105-023-006	2
Maternité	1105-023-013	2
Endoscopie	1105-023-008	2
Radiologie	1105-023-009	2
Chirurgie ambulatoire	1105-023-011	2
Labo G.I.	1105-023-014	2
Labo cath.	1105-023-010	2
Chirurgie le jour même	1105-023-012	2
Échographie	1105-023-015	2
Démo Stryker	1105-023-016	2

Ensemble d'étiquetage - freins à quatre côtés

0747-010-200 Rév. B (référence uniquement)

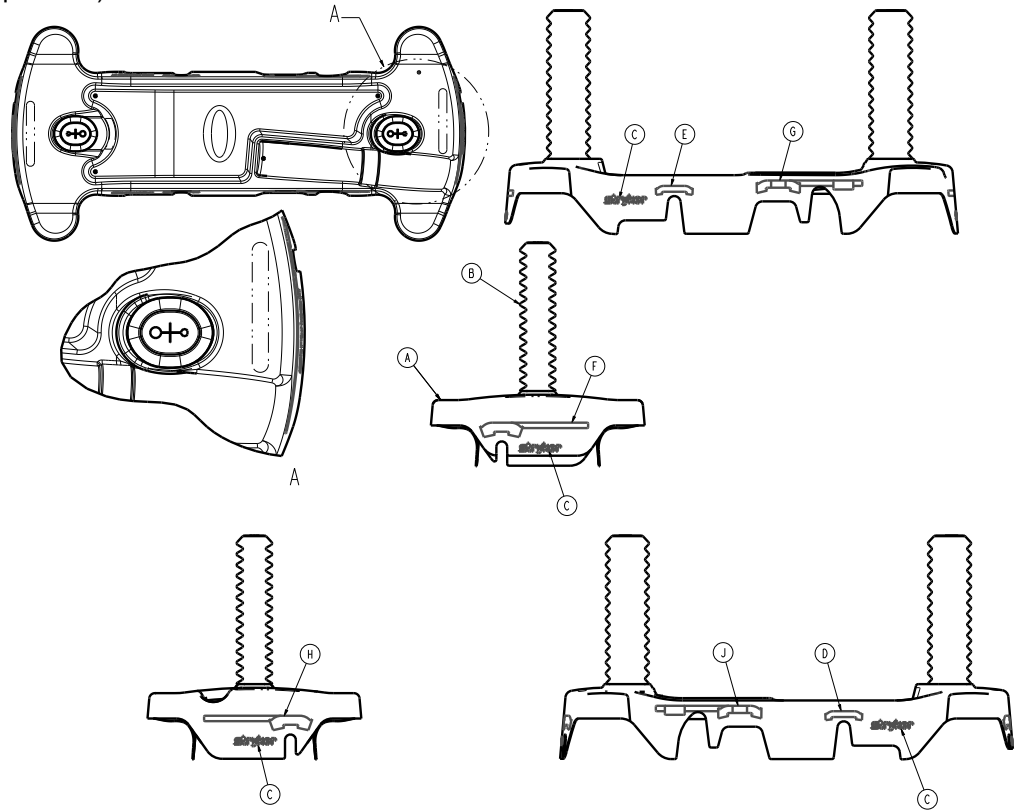


Élément	Numéro	Nom	Quantité
A	0747-001-034	Capot, freins à quatre côtés	1
B	0747-010-134	Soufflets	2
C	0946-201-060	Étiquette, logo Stryker	4
D	0853-010-018	Étiquette, frein/guidage, droite	1
E	0853-010-019	Étiquette, frein/guidage, gauche	1
F	0753-010-351	Étiquette, frein/guidage, côté pieds	1
G	0853-010-355	Étiquette, élévation-abaissement, gauche	1
H	0753-010-370	Étiquette, commande de frein/guidage, côté tête	1
J	0853-010-354	Étiquette, élévation-abaissement, droite	1


Étiquettes du service	Numéro	Quantité
Urgence	1105-023-004	2
USPA	1105-023-007	2
Transport	1105-023-005	2
Chirurgie	1105-023-006	2

Étiquettes du service	Numéro	Quantité
Maternité	1105-023-013	2
Endoscopie	1105-023-008	2
Radiologie	1105-023-009	2
Chirurgie ambulatoire	1105-023-011	2
Labo G.I.	1105-023-014	2
Labo cath.	1105-023-010	2
Chirurgie le jour même	1105-023-012	2
Échographie	1105-023-015	2
Démo Stryker	1105-023-016	2

Ensemble de plan de couchage, standard - modèle 747

0747-301-010 Rév. AA (référence uniquement)

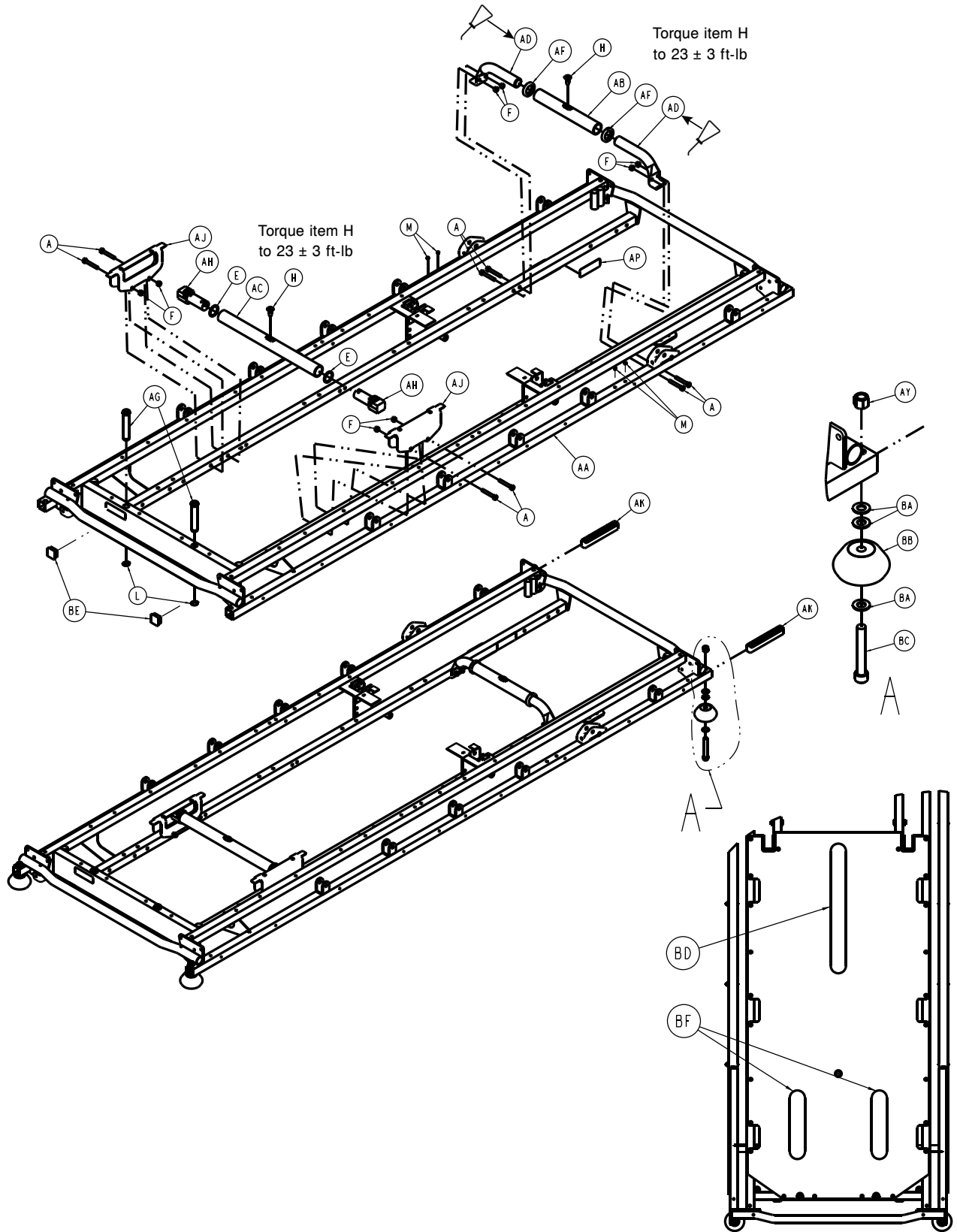

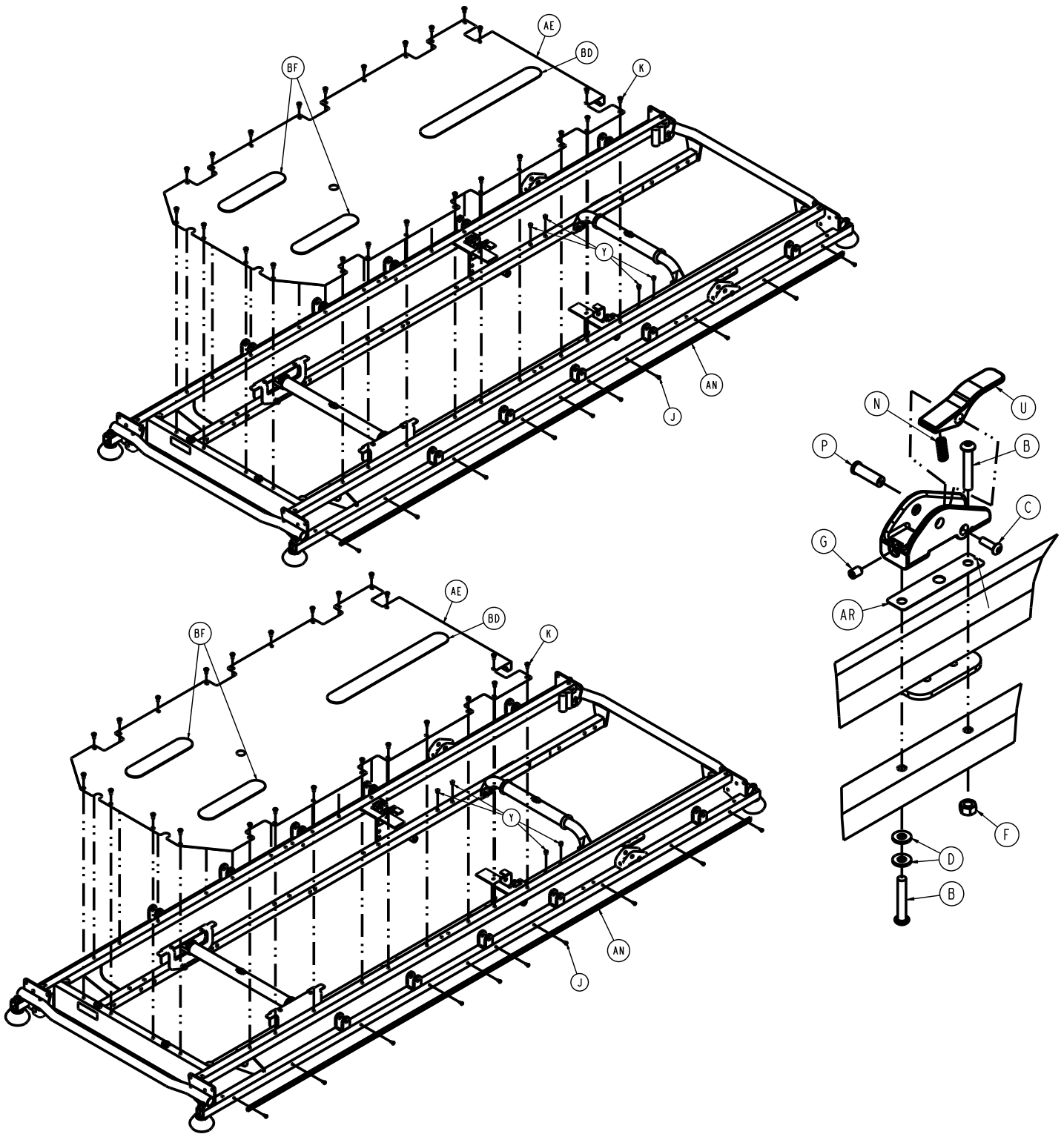

Élément	Numéro	Nom	Quantité
A	0003-078-000	Vis d'assemblage à tête hexagonale	8
B	0004-135-000	Vis d'assemblage à tête ronde	4
C	700000689500	Vis d'assemblage à tête ronde	14
D	0011-002-000	Rondelle	4
E	0011-360-000	Rondelle	2


Élément	Numéro	Nom	Quantité
F	0016-028-000	Écrou hexagonal	10
G	0021-104-000	Vis de blocage	2
H	0007-074-000	Vis à métaux à tête bombée	2
J	0025-038-000	Rivet	20
K	0025-079-000	Rivet	24
L	0028-023-000	Bague de retenue externe	2
M	0037-074-000	Bouchon de trou	4
N	0038-220-000	Ressort à compression	2
P	0721-026-066	Vis de pivot	14
R	0721-026-068	Nacelle verticale	6
T	0721-026-069	Douille verticale	4
U	0721-026-074	Poignée de verrouillage	2
V	0721-026-096	<i>Ensemble de barrière - Modèle 747 (page 58)</i>	1
W	0721-026-097	<i>Ensemble de barrière - Modèle 747 (page 58)</i>	1
Y	0721-031-065	Bouchon de trou	4
AA	0747-201-020	Ensemble soudé du châssis du plan de couchage	1
AB	0742-010-036	Tube de support, côté tête	1
AC	0742-010-042	Tube de support, côté pieds	1
AD	0753-010-043	Tube de support à vérin, côté tête	2
AE	0747-010-044	Revêtement de la section pieds stationnaire	1
AF	0938-001-401	Collier	2
AG	1001-040-012	Logement du pied de lit	2
AH	1001-201-029	Insert en nylon	2
AJ	1001-401-030	Support de déclive	2
AK	1010-026-069	Support de verrouillage	2
AL	0742-026-087	Boîtier de verrouillage, gauche	1
AM	0742-026-086	Boîtier de verrouillage, droit	1
AN	1010-201-027	Canal de pare-chocs	2
AP	1210-800-008	Étiquette, brevet	1
AR	0747-026-103	Dispositif de retenue de ressort	2
AY	0016-035-000	Écrou hexagonal nylon	4
BA	0014-021-000	Rondelle	12

Élément	Numéro	Nom	Quantité
BB	1089-400-142	Pare-chocs	4
BC	0004-201-000	Vis d'assemblage à six pans creux	4
BD	7900-001-102	Partie velours du Velcro®	distance entre seuil et civière de 17 po (43 cm)
BE	0037-010-000	Coulisse unique	2
BF	7900-001-102	Partie velours du Velcro®	1,5 pied (45,7 cm)

Ensemble de barrière - Modèle 747

0721-026-096 (droite) Rév. C (référence uniquement)


0721-026-097 (gauche) Rév. C (référence uniquement)

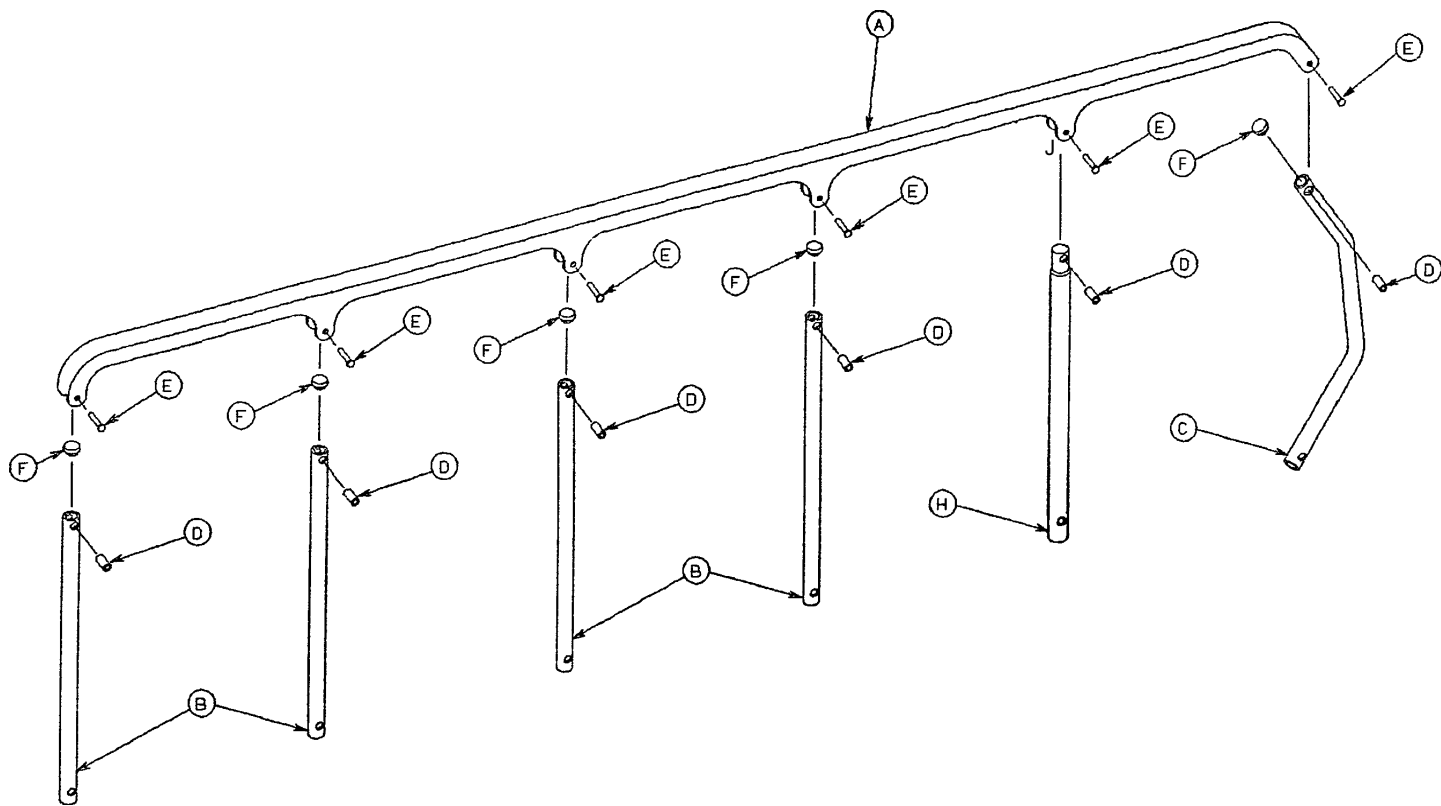

Élément	Numéro	Nom	Quantité
A	1010-026-015	Rail supérieur	1
B	1010-026-083	Vertical	4
C	1010-026-084	Vertical, courbé	1
D	1010-026-082	Roulement à douille	6
E	0025-106-000	Rivet semi-tubulaire	6
F	1010-026-010	Bouchon de maintien rond	4
H	1010-026-085	Vertical, verrou	1
J	1010-026-012	Butée de fuseau courbée	1

Ensemble de plan de couchage, relève-buste au châssis - modèle 747


0744-231-110 Rév. B (référence uniquement)

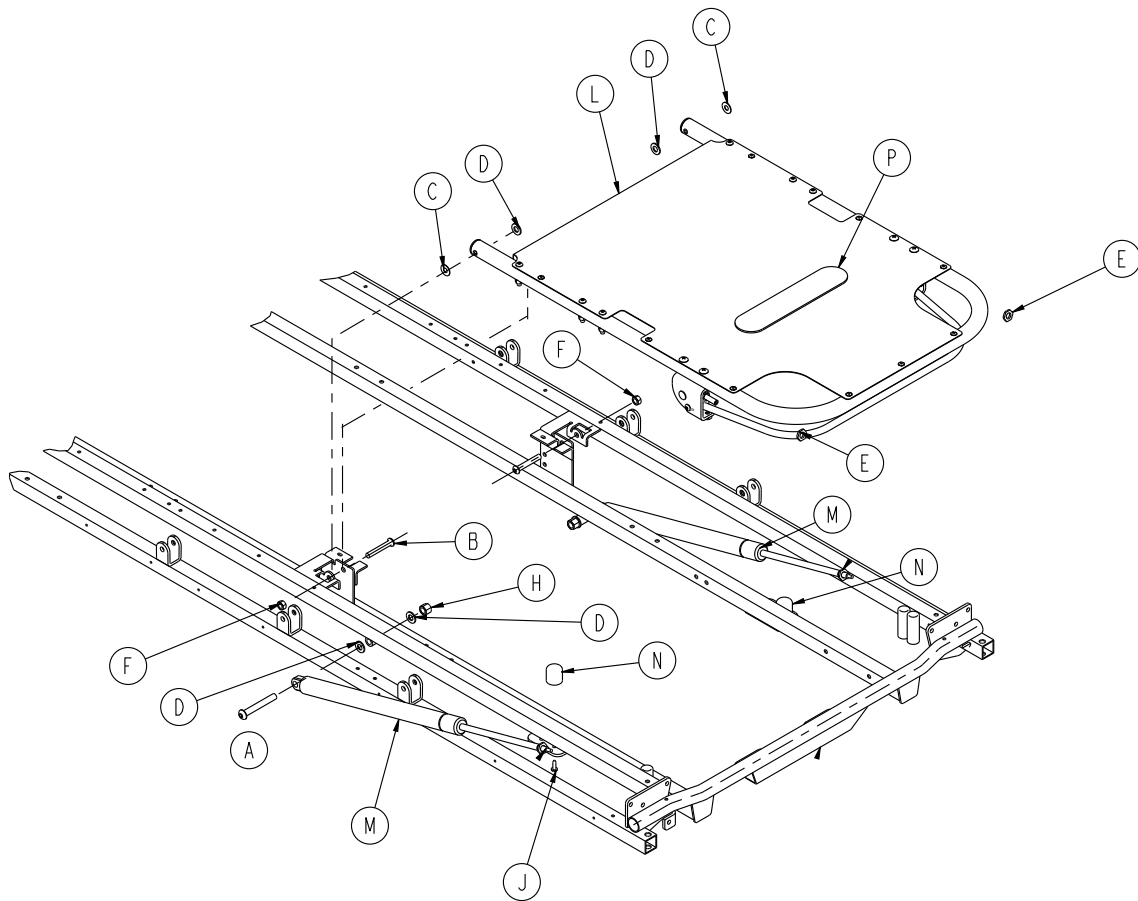

Élément	Numéro	Nom	Quantité
A	0004-182-000	Vis d'assemblage à tête ronde creuse	2
B	0004-183-000	Vis d'assemblage à tête ronde creuse	2
C	0011-079-000	Rondelle	2
D	0014-021-000	Rondelle	6
E	0015-060-000	Écrou hexagonal métrique	2
F	0016-036-000	Écrou hexagonal nylon	2
H	0016-117-000	Écrou hexagonal	2
J	0023-256-000	Vis de taraudage à tête cylindrique	2
L	0744-231-120	<i>Ensemble de plan de couchage, relève-buste pneumatique - modèle 747 (page 60)</i>	1
M	1010-031-078	Bouteille de gaz	2
N	1211-031-031	Relève-buste pneumatique	2
P	7900-001-102	Partie velours du Velcro®	distance entre seuil et civière de 9 po (23 cm)

Ensemble de plan de couchage, relève-buste pneumatique - modèle 747

0744-231-120 Rév. A (référence uniquement)

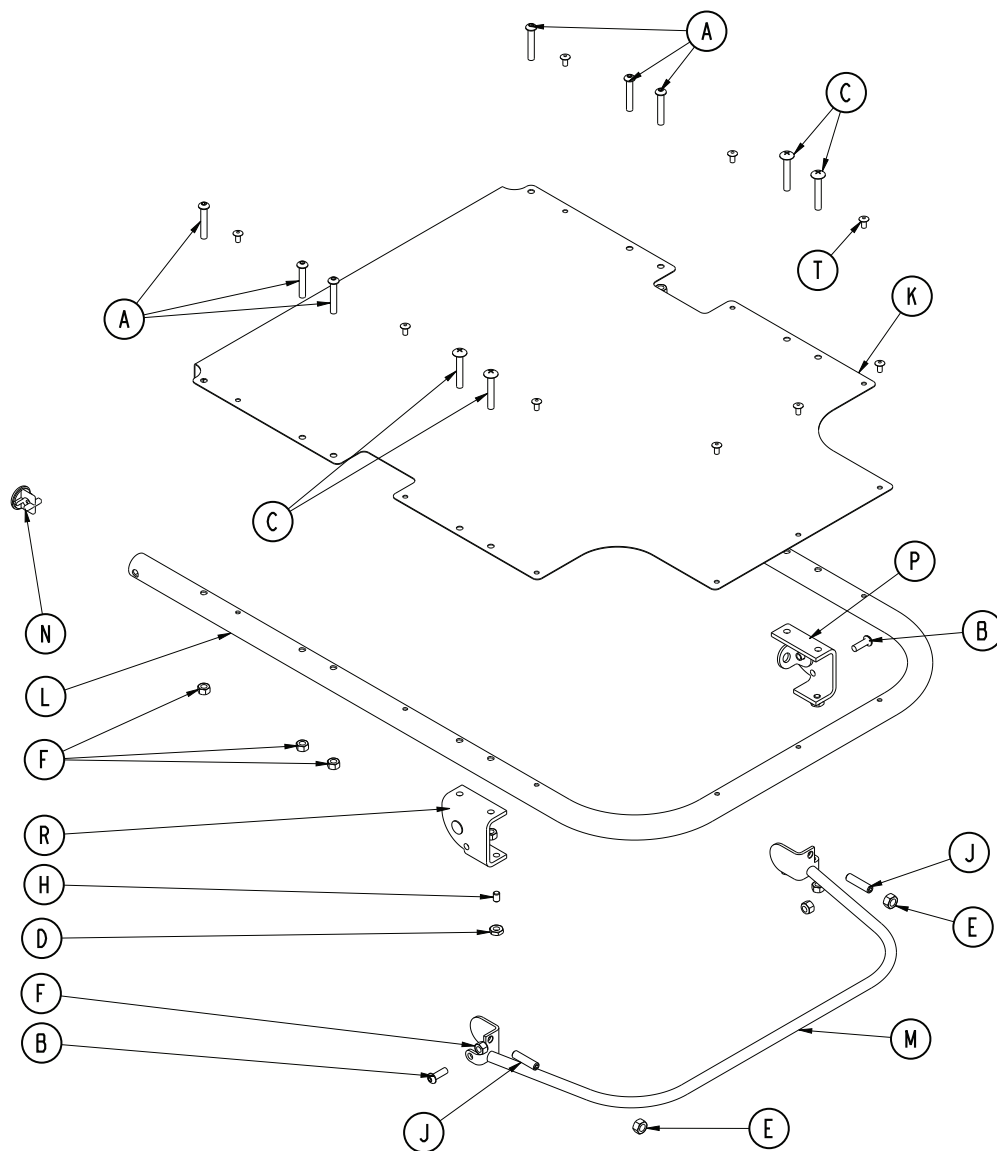


Élément	Numéro	Nom	Quantité
A	0004-135-000	Vis d'assemblage à tête ronde	6
B	0004-161-000	Vis d'assemblage à tête ronde	2
C	0007-071-000	Vis à métaux à tête bombée	4
D	0015-037-000	Contre-écrou hexagonal	2
E	0015-050-000	Écrou hexagonal	2
F	0016-028-000	Écrou hexagonal Fiberlock	12
H	0021-125-000	Vis de blocage	2
J	0021-126-000	Vis de blocage	2

Élément	Numéro	Nom	Quantité
K	0721-231-012	Revêtement du relève-buste	1
L	0721-231-013	Tube du relève-buste	1
M	0721-231-118	Ensemble de barre de verrouillage	1
N	1001-001-036	Bouchon de trou	2
P	1210-031-106	<i>Ensemble de boîtier externe, droite - 1210-031-106 (page 62)</i>	1
R	1210-031-107	<i>Ensemble de boîtier externe, gauche - 1210-031-107 (page 63)</i>	1
T	0025-079-000	Rivet	9

Ensemble de boîtier externe, droite - 1210-031-106


Rév. A (référence uniquement)

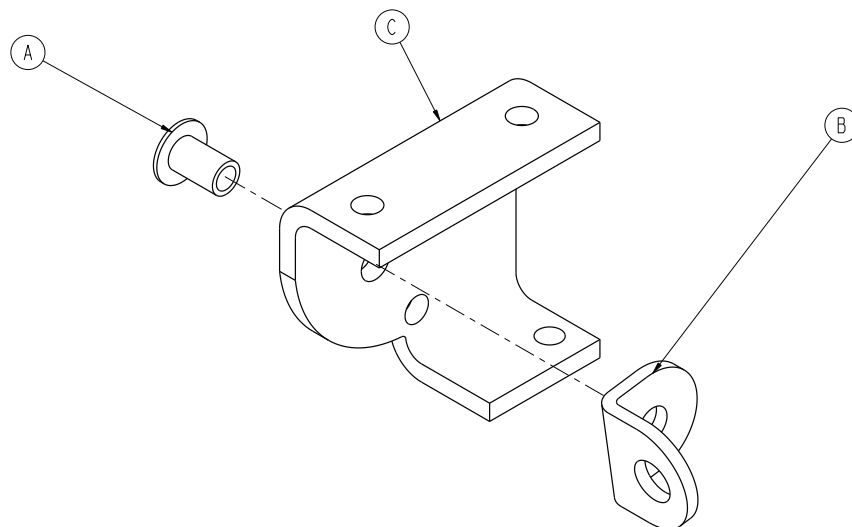

Élément	Numéro	Nom	Quantité
A	0025-174-000	Rivet	1
B	1210-031-103	Taquet pivotant	1
C	1210-031-104	Boîtier externe, droit	1

Ensemble de boîtier externe, gauche - 1210-031-107


Rév. A (référence uniquement)

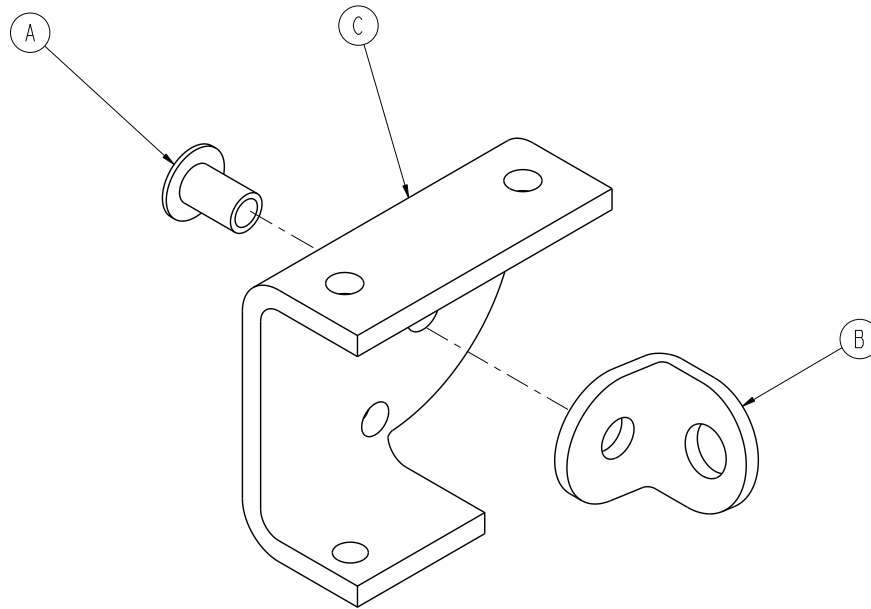


Élément	Numéro	Nom	Quantité
A	0025-174-000	Rivet	1
B	1210-031-103	Taquet pivotant	1
C	1210-031-105	Boîtier externe, gauche	1

Ensemble de plan de couchage, standard - modèle 748

0748-010-010 Rév. AA (référence uniquement)

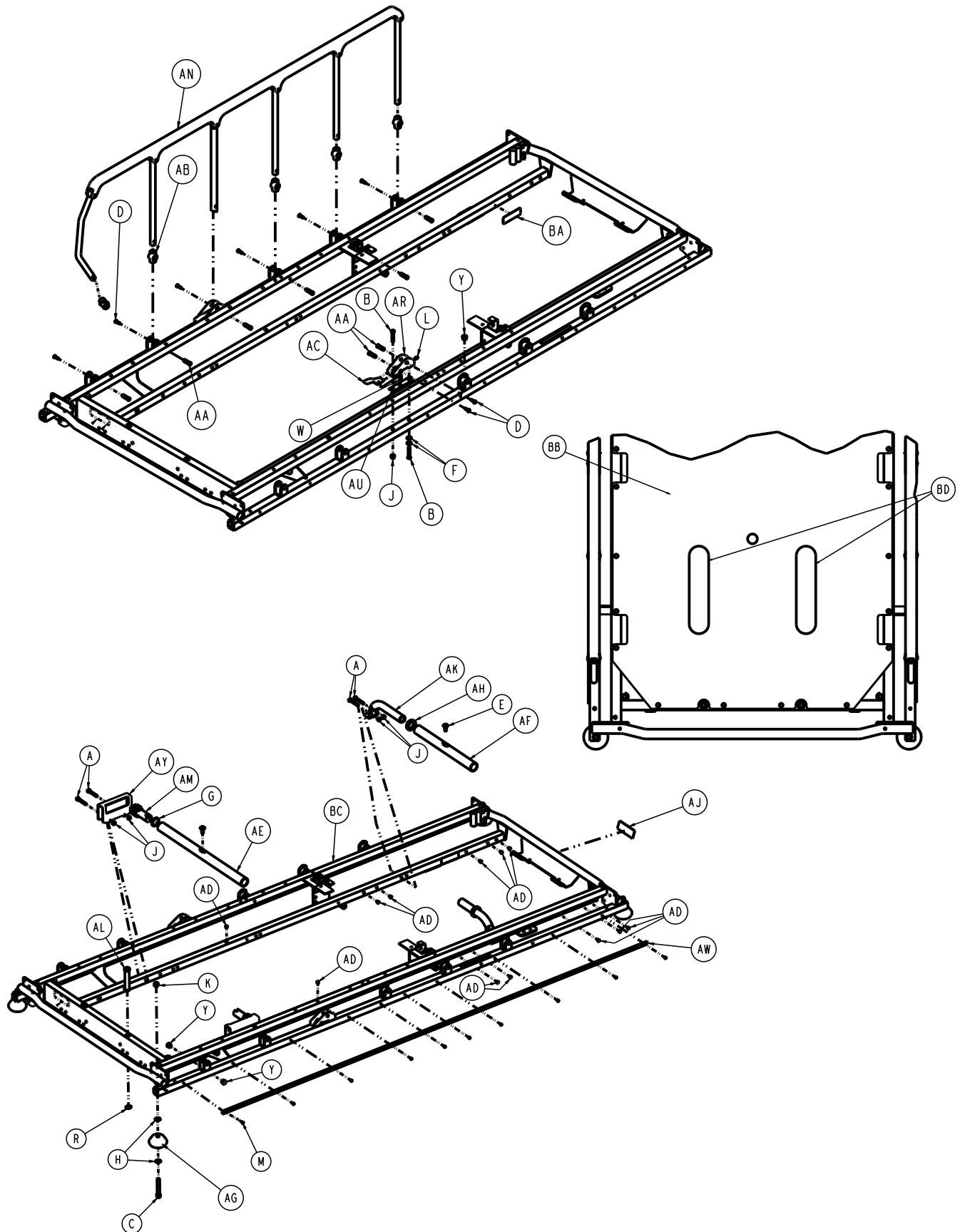

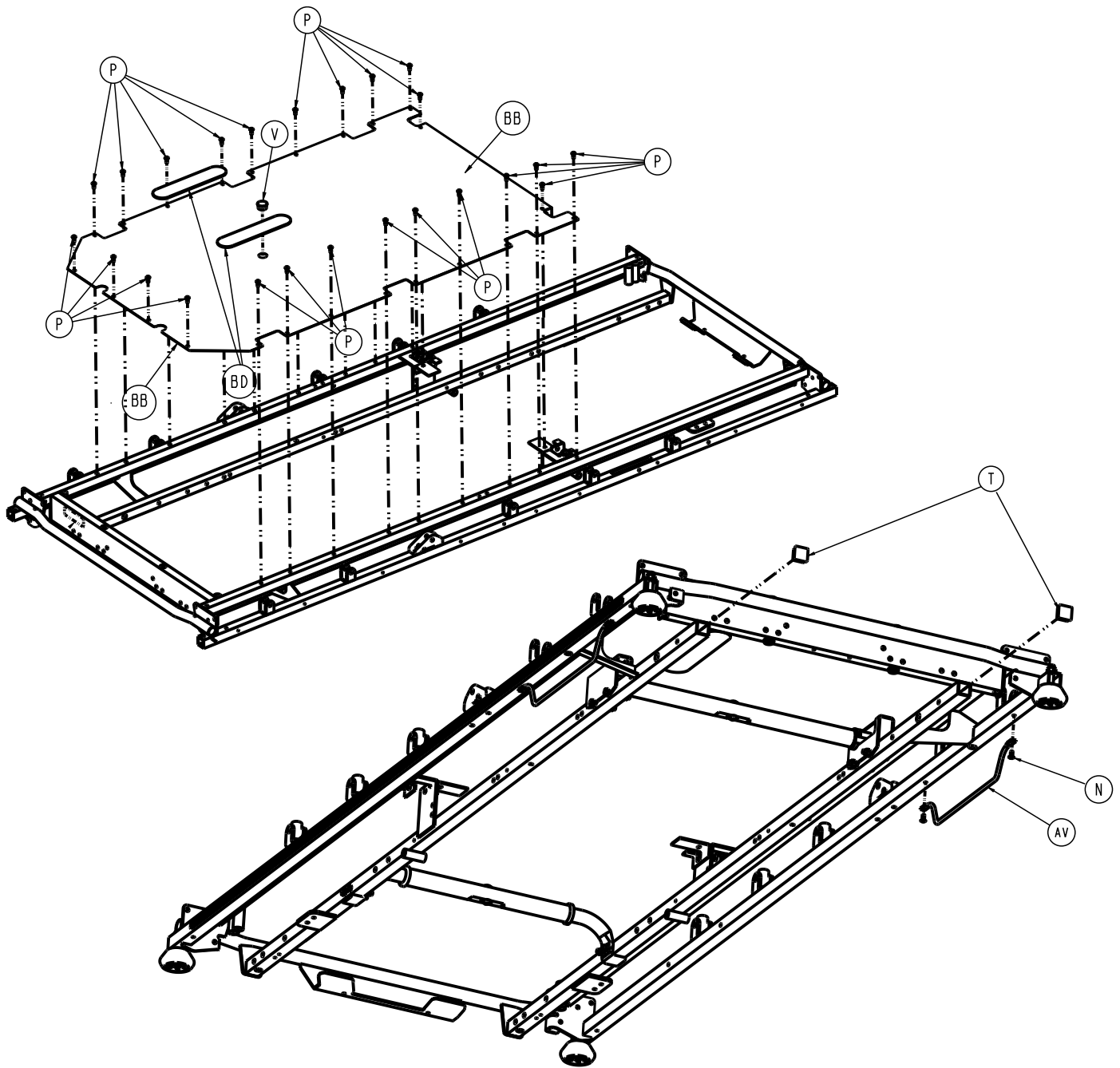

Élément	Numéro	Nom	Quantité
A	0003-078-000	Vis d'assemblage à tête hexagonale	8
B	0004-135-000	Vis d'assemblage à tête ronde	4
C	0004-201-000	Vis d'assemblage à six pans creux	4
D	700000689500	Vis d'assemblage à tête ronde	14
E	0007-074-000	Vis à métaux à tête bombée	2
F	0011-002-000	Rondelle	4
G	0011-360-000	Rondelle	2
H	0014-021-000	Rondelle	12


Élément	Numéro	Nom	Quantité
J	0016-028-000	Écrou hexagonal Fiberlock	10
K	0016-035-000	Écrou hexagonal nylon	4
L	0021-104-000	Vis de blocage	2
M	0025-038-000	Rivet	20
N	0025-079-000	Rivet	4
P	0025-171-000	Rivet	24
R	0028-023-000	Bague de retenue, externe	2
T	0037-010-000	Bouchon de trou	2
V	0037-208-000	Bouchon de trou	1
W	0038-220-000	Ressort à compression	2
Y	0059-100-000	Bouchon de trou	6
AA	0721-026-066	Vis de pivot	14
AB	0721-026-069	Douille verticale	10
AC	0721-026-074	Poignée de verrouillage	2
AD	0721-031-065	Bouchon de trou	22
AE	0742-010-026	Tube de support	1
AF	1037-010-030	Tube de support	1
AG	1089-400-142	Pare-chocs	4
AH	0938-001-401	Collier	2
AJ	0946-001-060	Étiquette, logo Stryker	1
AK	1001-001-037	Tube de support à vérin, côté tête	2
AL	1001-040-012	Logement du pied de lit	2
AM	1001-201-029	Insert en nylon	2
AN	1010-026-017	<i>Ensemble de barrière latérale (page 68)</i>	1
AP	1010-026-019	<i>Ensemble de barrière latérale (page 68)</i>	1
AR	0742-026-086	Boîtier de verrouillage, droit	1
AT	0742-026-087	Boîtier de verrouillage, gauche	1
AU	0747-026-103	Dispositif de retenue de ressort	2
AV	1010-032-092	Support pour poche urinaire	2
AW	1010-201-027	Canal de pare-chocs	2
AY	1070-010-023	Support de déclive	2
BA	1210-800-008	Étiquette, brevet	1
BB	0748-432-021	Peau de la section pieds	1

Élément	Numéro	Nom	Quantité
BC	0748-030-005	Ensemble soudé du châssis	1
BD	7900-001-102	Partie velours du Velcro®	1,5 pied (45,7 cm)

Ensemble de barrière latérale

1010-026-017 Rév. D (référence uniquement)


1010-026-019 Rév. D (référence uniquement)

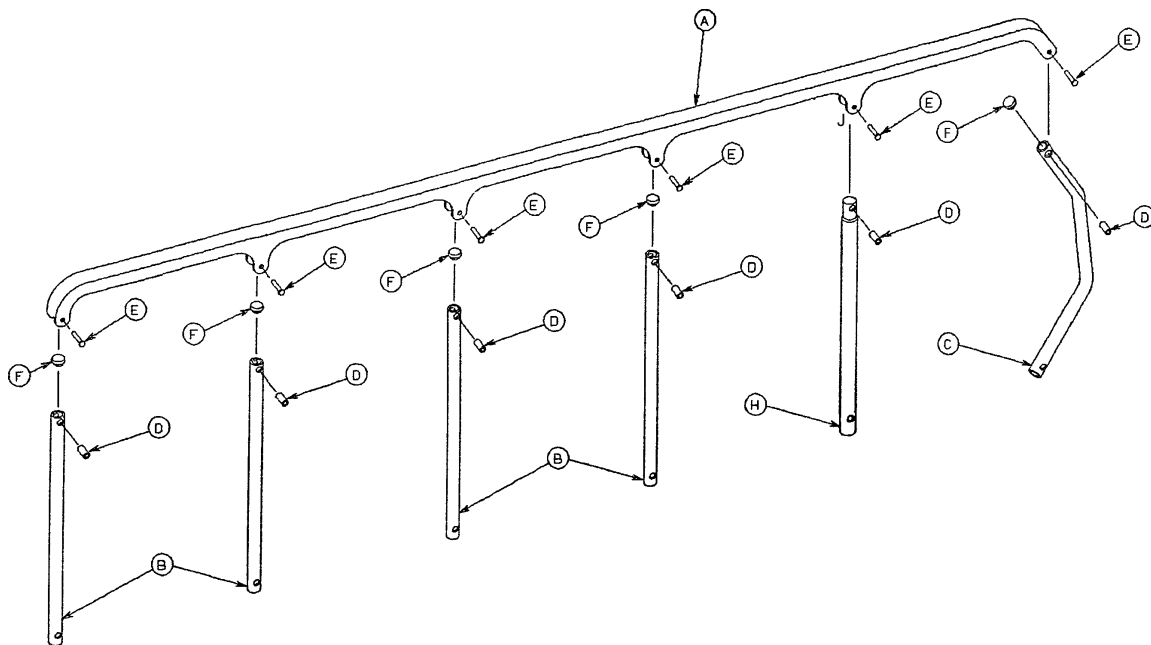

Élément	Numéro	Nom	Quantité
A	1010-026-015	Rail supérieur	1
B	1010-026-083	Vertical	4
C	1010-026-084	Vertical, courbé	1
D	1010-026-082	Roulement à douille	6
E	0025-106-000	Rivet aveugle	6
F	1010-026-010	Bouchon pour trou rond	4
H	1010-026-085	Vertical, verrou	1
J	1010-026-012	Support de montant courbé	1

Ensemble de plan de couchage, relève-buste au plan de couchage - modèle 748

0746-031-010 Rév. A (référence uniquement)

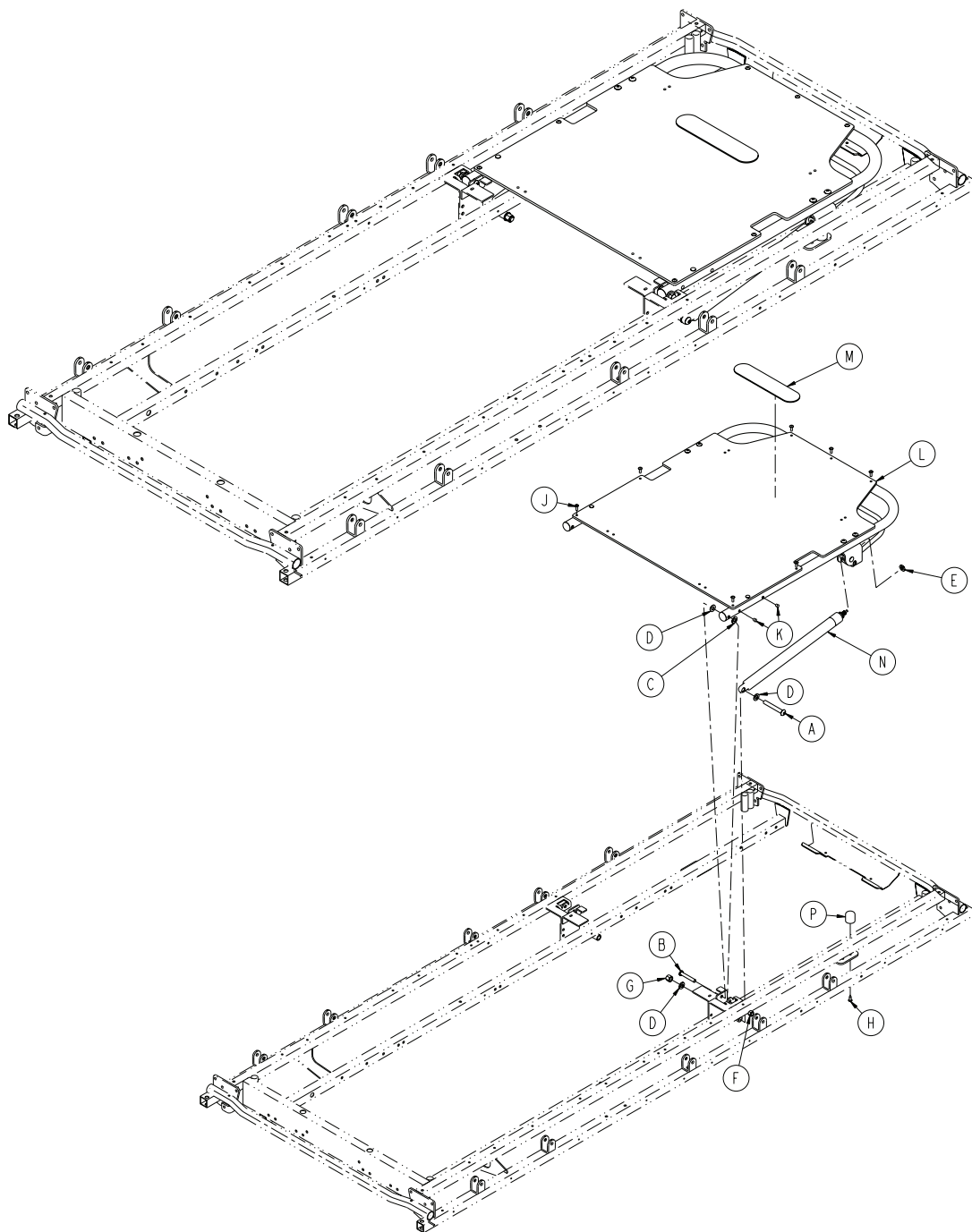


Élément	Numéro	Nom	Quantité
A	0004-182-000	Vis d'assemblage à tête ronde	2
B	0004-183-000	Vis d'assemblage à tête ronde	2
C	0014-020-000	Rondelle	2
D	0014-021-000	Rondelle	6

Élément	Numéro	Nom	Quantité
E	0015-060-000	Écrou hexagonal métrique	2
F	0016-036-000	Écrou hexagonal nylon	2
G	0016-117-000	Contre-écrou hexagonal	2
H	0023-256-000	Vis de taraudage à tête cylindrique	2
J	0025-050-000	Rivet	7
K	0721-031-065	Bouchon de trou	4
L	0748-031-120	<i>Ensemble de plan de couchage, relève-buste pneumatique - modèle 748 (page 71)</i>	1
M	7900-001-102	Partie velours du Velcro®	distance entre seuil et civière de 9 po (23 cm)
N	1010-031-078	Bouteille de gaz	2
P	1211-031-031	Relève-buste pneumatique	2

Ensemble de plan de couchage, relève-buste pneumatique - modèle 748

0748-031-120 Rév. A (référence uniquement)


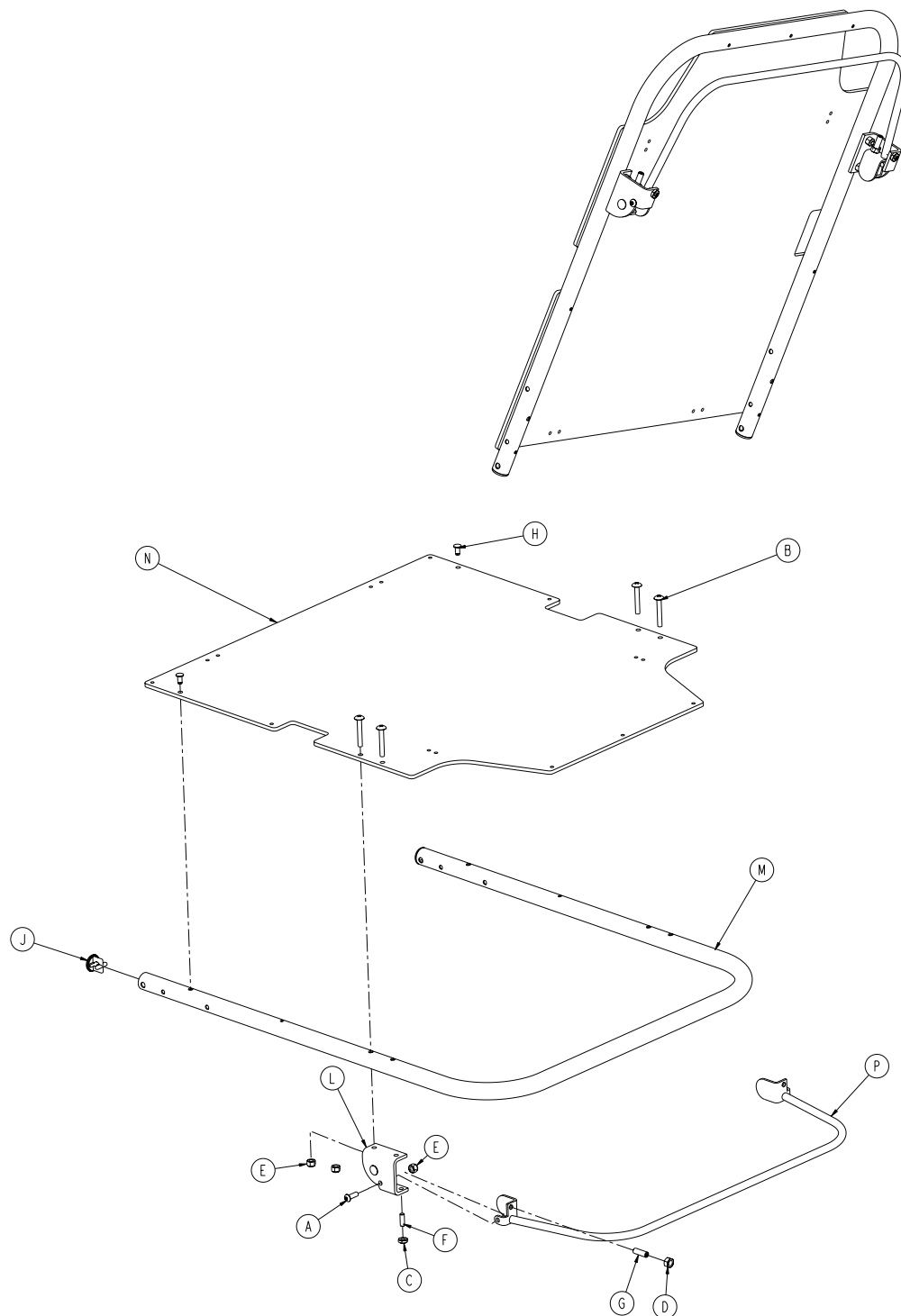



Élément	Numéro	Nom	Quantité
A	0004-161-000	Vis d'assemblage à tête ronde	2
B	0007-020-000	Vis à métaux à tête bombée	4


Élément	Numéro	Nom	Quantité
C	0015-037-000	Contre-écrou hexagonal	2
D	0015-050-000	Écrou hexagonal	2
E	0016-028-000	Écrou hexagonal Fiberlock	6
F	0021-125-000	Vis de blocage	2
G	0021-126-000	Vis de blocage	2
H	0025-120-000	Rivet pop	2
J	1001-001-036	Bouchon de trou	2
K	1210-031-106	<i>Ensemble de boîtier externe, droite - 1210-031-106 (page 62)</i>	1
L	1210-031-107	<i>Ensemble de boîtier externe, gauche - 1210-031-107 (page 63)</i>	1
M	0748-031-013	Tube du relève-buste	1
N	15210-231-012	Revêtement du relève-buste	1
P	1710-031-118	Ensemble de barre de verrouillage	1

Ensemble de plan de couchage avec option de relève-jambes - modèle 748

0746-010-010 Rév. AA (référence uniquement)

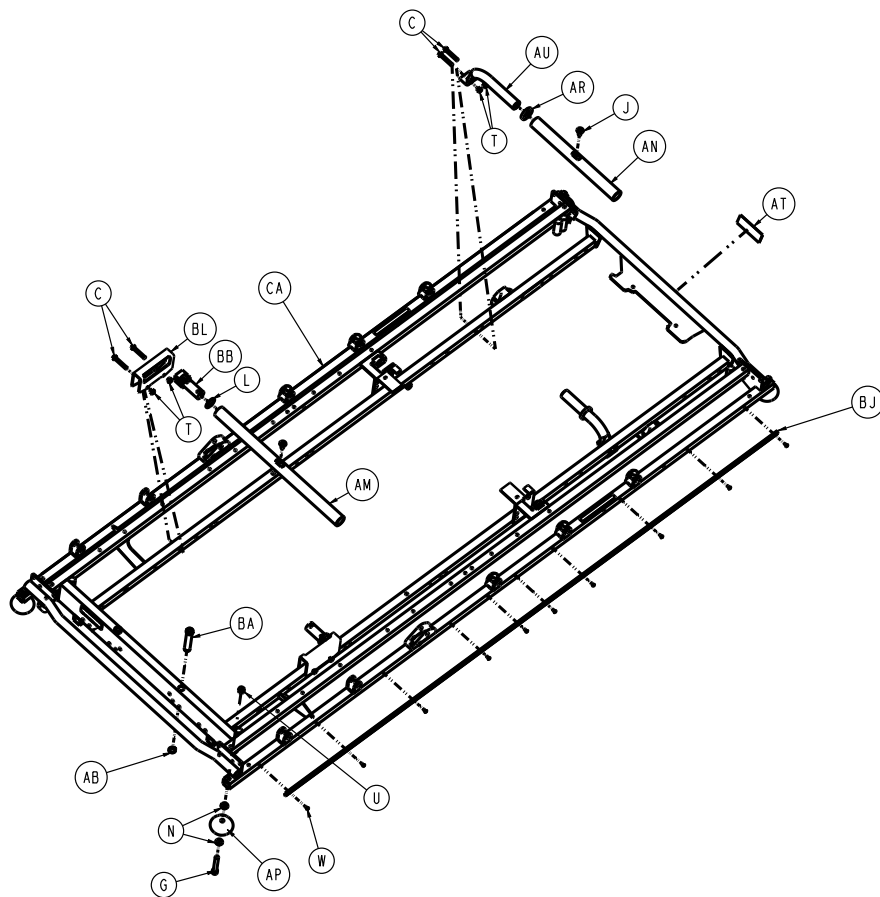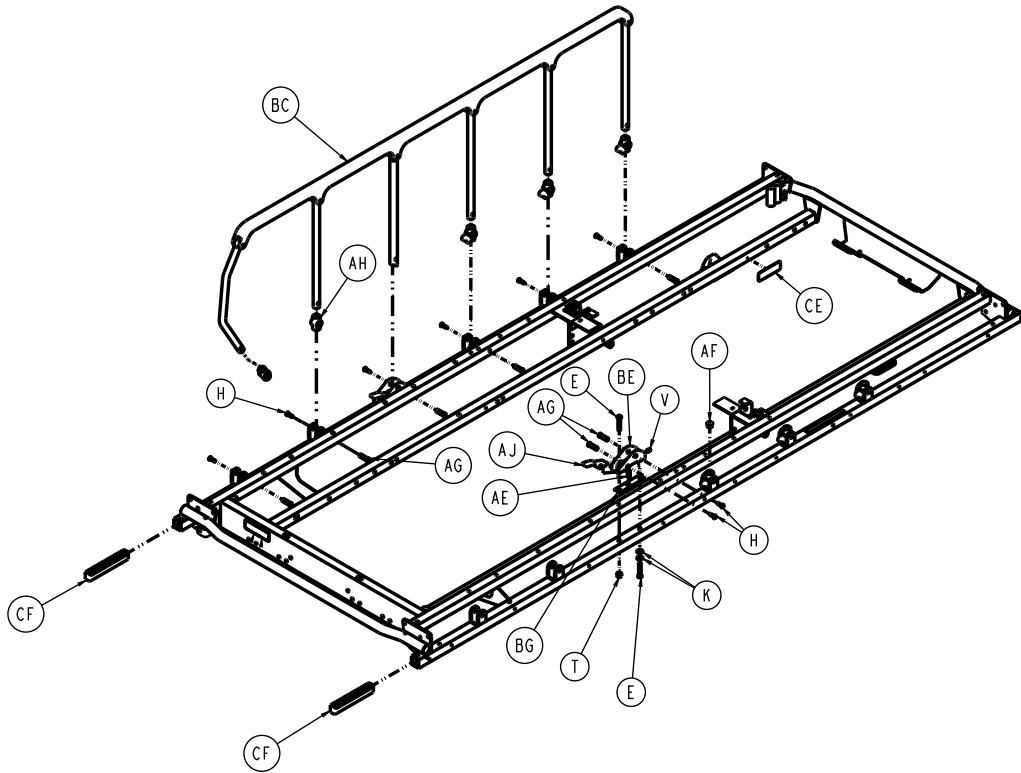

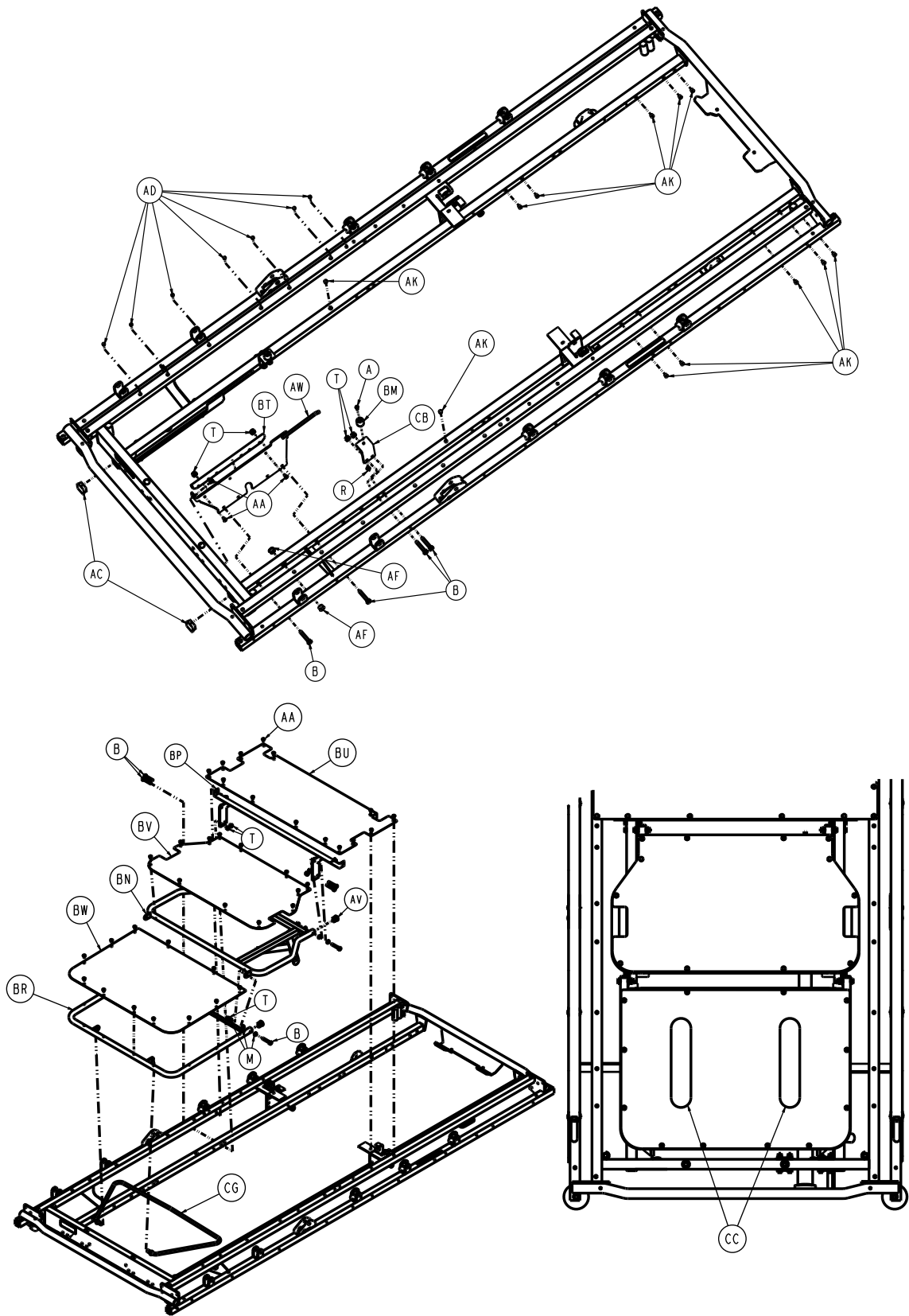

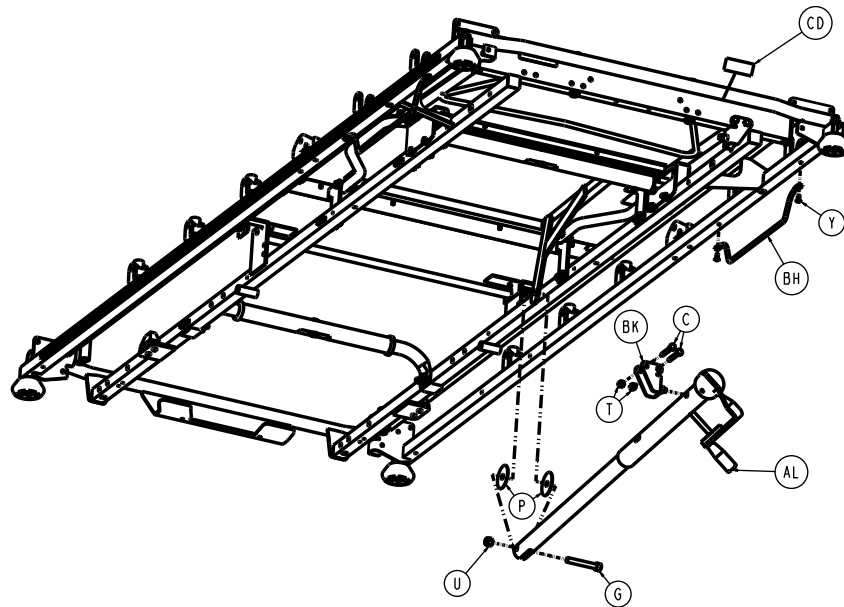


Élément	Numéro	Nom	Quantité
A	0002-031-000	Vis à métaux	2
B	0003-047-000	Vis d'assemblage à tête hexagonale	16
C	0003-078-000	Vis d'assemblage à tête hexagonale	12
E	0004-135-000	Vis d'assemblage à tête ronde	4
G	0004-201-000	Vis d'assemblage à six pans creux	5
H	700000689500	Vis d'assemblage à tête ronde	14
J	0007-074-000	Vis à métaux à tête bombée	2
K	0011-002-000	Rondelle	4
L	0011-360-000	Rondelle	2
M	0014-003-000	Rondelle	12
N	0014-021-000	Rondelle	8
P	0014-055-000	Rondelle	2
R	0016-014-000	Écrou hexagonal Fiberlock	2
T	0016-028-000	Écrou hexagonal Fiberlock	30
U	0016-035-000	Écrou hexagonal nylon	5
V	0021-104-000	Vis de blocage	2
W	0025-038-000	Rivet à tête en dôme	20
Y	0025-079-000	Rivet à tête en dôme	4
AA	0025-122-000	Rivet à tête en dôme	46
AB	0028-023-000	Bague de retenue externe	2
AC	0037-010-000	Bouchon de trou	2
AD	0037-074-000	Bouchon de trou	14
AE	0038-220-000	Ressort à compression	2

Élément	Numéro	Nom	Quantité
AF	0059-100-000	Bouchon de trou	6
AG	0721-026-066	Vis de pivot	14
AH	0721-026-069	Douille verticale	10
AJ	0721-026-074	Poignée de verrouillage	2
AK	0721-031-065	Bouchon de trou	22
AL	0746-046-010	<i>Ensemble de vis de manivelle du relève-jambes en option (page 78)</i>	1
AM	0742-010-026	Tube de support	1
AN	1037-010-030	Tube de support	1
AP	1089-400-142	Pare-chocs	4
AR	0938-001-401	Collier	2
AT	0946-001-060	Étiquette, logo Stryker	1
AU	1001-001-037	Tube de support à vérin, côté tête	2
AV	1001-034-025	Bouchon de trou	4
AW	0748-034-029	Ensemble de support de glissière, gauche	1
AY	0748-034-030	Ensemble de support de glissière, droit	1
BA	1001-040-012	Logement du pied de lit	2
BB	1001-201-029	Insert en nylon	2
BC	1010-026-017	<i>Ensemble de barrière latérale (page 68)</i>	1
BD	1010-026-019	<i>Ensemble de barrière latérale (page 68)</i>	1
BE	0742-026-086	Ensemble de boîtier de verrouillage, droit	1
BF	0742-026-087	Ensemble de boîtier externe, gauche	1
BG	0747-026-103	Dispositif de retenue de ressort	2
BH	1010-032-092	Support pour poche urinaire	2
BJ	1010-201-027	Canal de pare-chocs	2
BK	0748-234-015	Ensemble de support de montage	2
BL	1070-010-023	Support de déclive	2
BM	1070-014-009	Pare-chocs	2
BN	0748-034-011	Ensemble de châssis de cuisse	1
BP	0748-034-023	Ensemble de support de section médiane	1
BR	0748-034-112	Ensemble soudé du châssis de mollets	1

Élément	Numéro	Nom	Quantité
BT	1510-034-090	Coussinet de glissière	2
BU	0748-234-027	Section médiane du revêtement	1
BV	0748-234-028	Revêtement de la section cuisse	1
BW	0748-234-126	Revêtement de la section mollets	1
CA	0748-030-005	Ensemble soudé du châssis	1
CB	0746-034-021	Support de cuisse	2
CC	7900-001-102	Partie velours du Velcro ®	1,5 pied (45,7 cm)
CD	1550-090-034	Étiquette, enclencher le relève-jambes	1
CE	1210-800-008	Étiquette, brevet	1
CF	1010-026-069	Support de verrouillage	2
CG	0746-031-127	Barre du support de mollets	1

Ensemble de vis de manivelle du relève-jambes en option

746-046-010 Rév. B (référence uniquement)

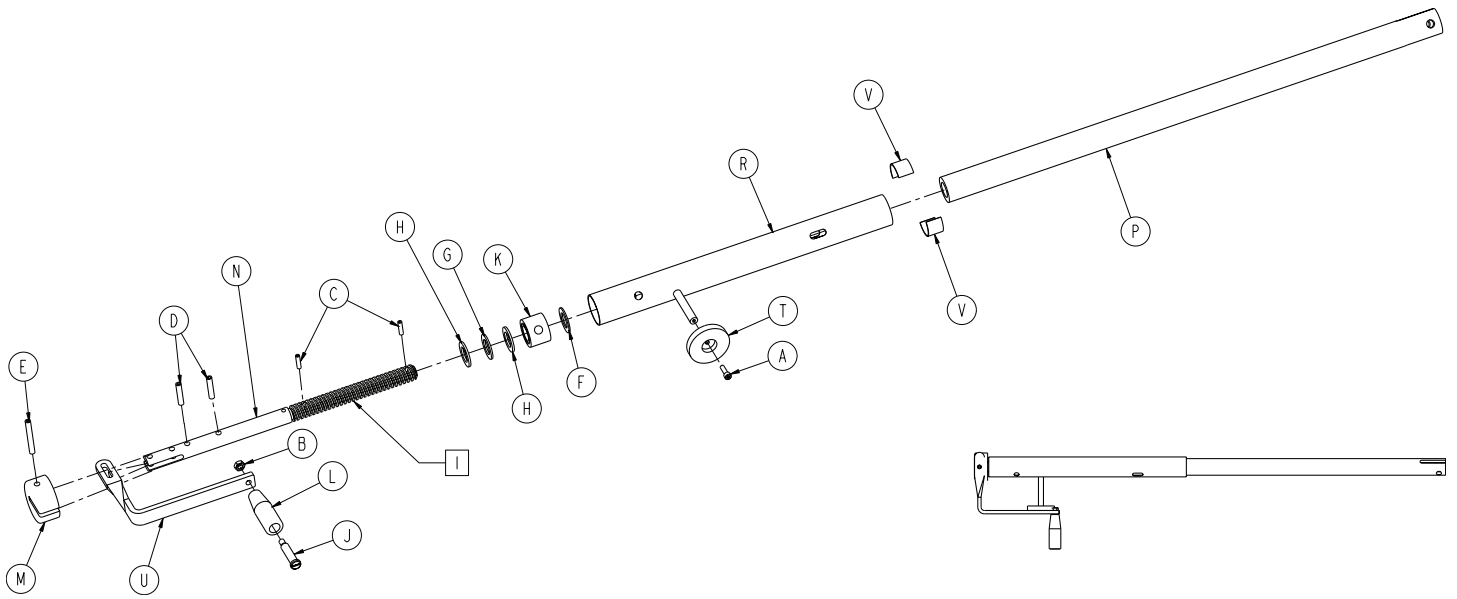


Élément	Número	Nom	Quantité
A	0004-007-000	Vis d'assemblage à six pans creux	1
B	0016-005-000	Écrou Conelock	1
C	0026-010-000	Goupille élastique fendue	2
D	0026-014-000	Goupille élastique fendue	2
E	0026-045-000	Goupille élastique fendue	1
F	0081-174-000	Rondelle	1
G	0081-175-000	Rondelle	1
H	0081-176-000	Rondelle	2
J	0378-024-029	Boulon à épaulement	1
K	0938-001-175	Ensemble de roulement	1
L	0938-001-177	Molette	1
M	0946-033-018	Disque de manivelle	1
N	1001-134-047	Vis du relève-jambes	1
P	1510-034-055	Ensemble de tube d'entraînement du relève-jambes	1
R	0748-034-084	Ensemble de cache-vis	1
T	1550-001-014	Aimant	1
U	1089-001-016	Poignée de manivelle	1
V	7900-001-102	Partie velours du Velcro®	2 po (5 cm)

Ensemble de protection d'angle

0746-035-010 Rév. A (tête) (référence uniquement)

0746-035-060 Rév. A (pieds) (référence uniquement)

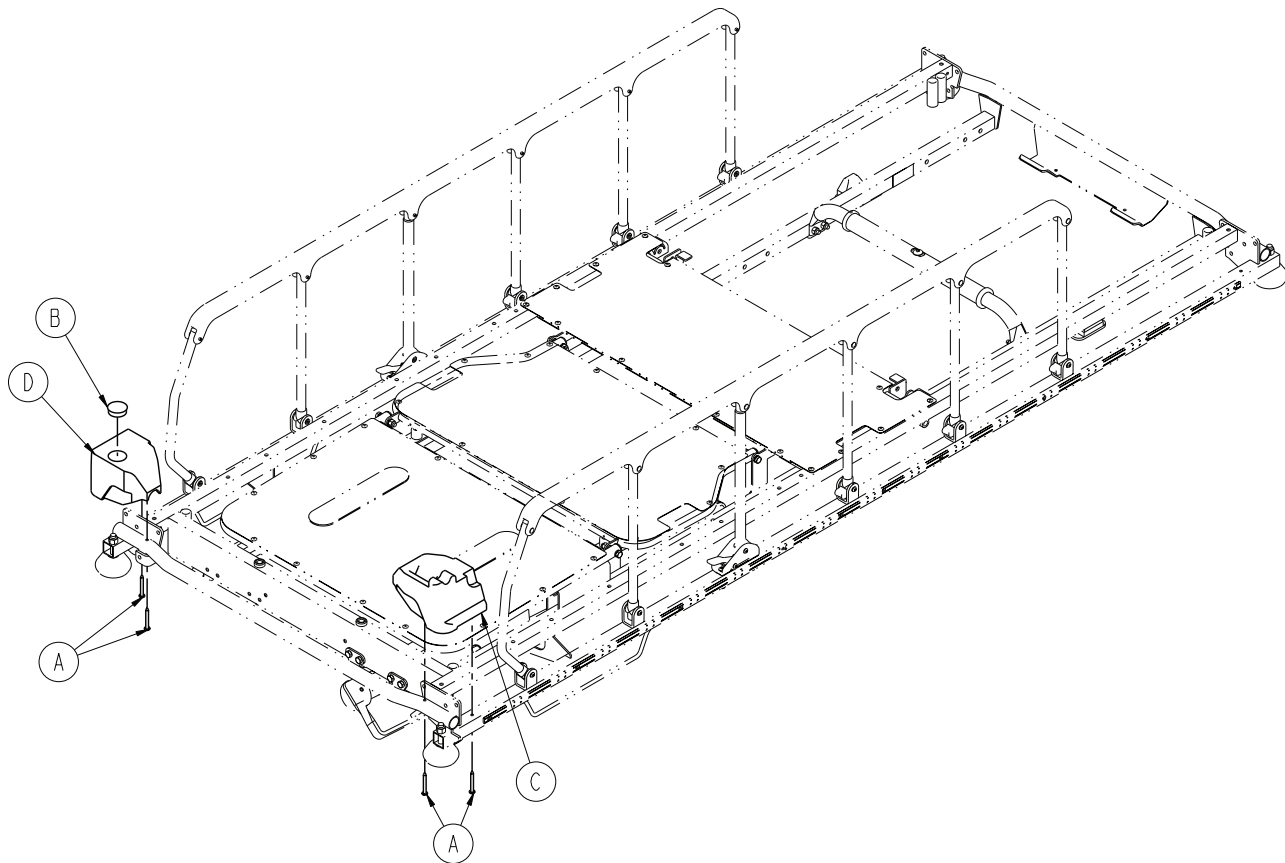


Élément	Numéro	Nom	Quantité
A	0023-283-000	Vis autotaraudeuse	4
B	0037-059-000	Bouchon pour trou Heyco	1
C	0742-201-238	Protection d'angle, fente	1
D	0742-201-239	Protection d'angle, trou	1

Ensemble de protection d'angle avec poignées de poussée en option

0746-035-015 Rév. A (tête) (référence uniquement)

0746-035-065 Rév. A (pieds) (référence uniquement)

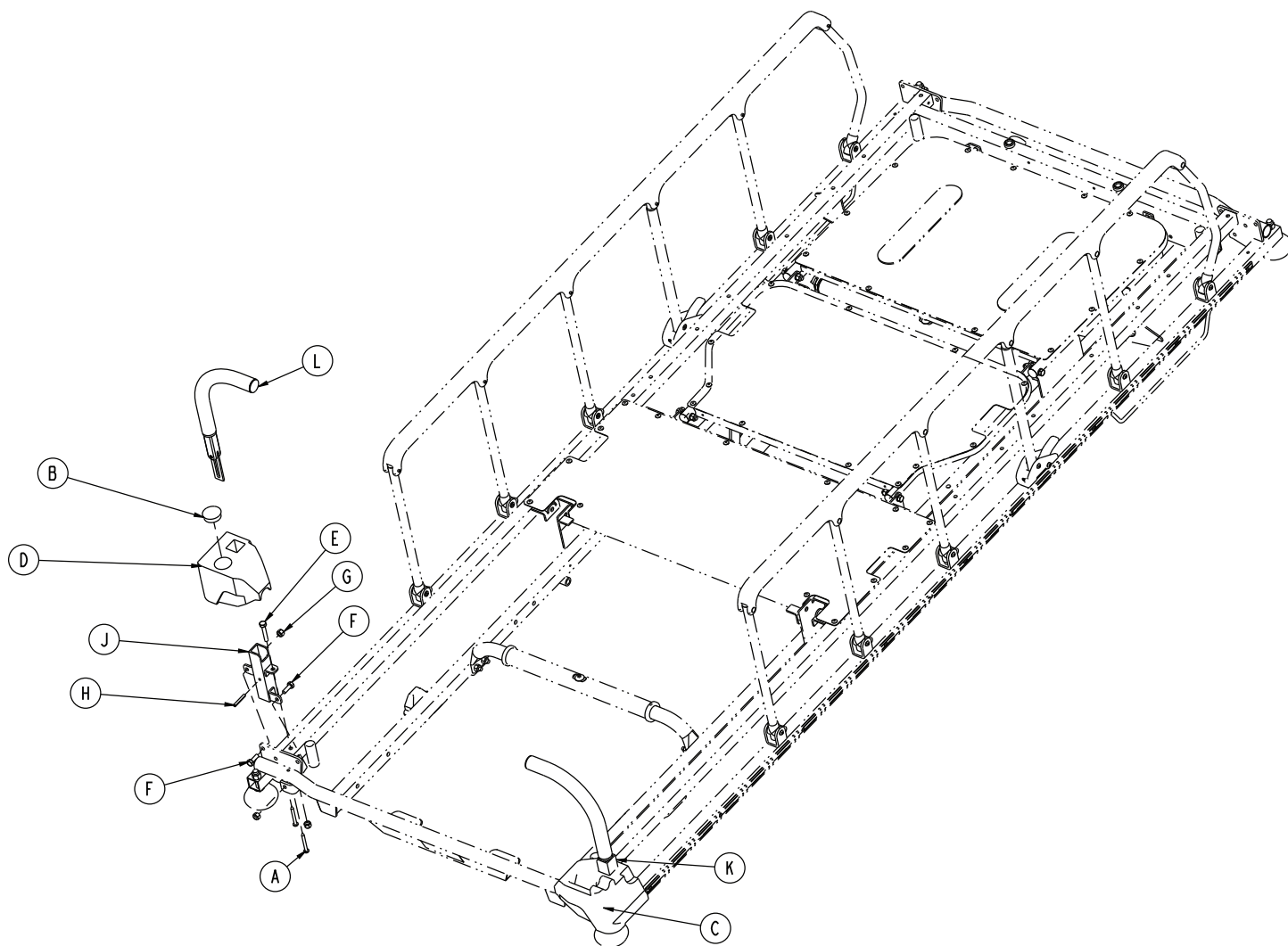


Élément	Numéro	Nom	Quantité
A	0023-283-000	Vis autotaraudeuse	4
B	0037-059-000	Bouchon pour trou Heyco	1
C	0742-201-236	Protection d'angle, fente	1
D	0742-201-237	Protection d'angle, trou	1
E	0003-047-000	Vis d'assemblage à tête hexagonale	2
F	0003-050-000	Vis d'assemblage à tête hexagonale	4
G	0016-028-000	Écrou hexagonal Fiberlock	6
H	0026-012-000	Goupille élastique fendue	2
J	0748-254-004	Douille de la poignée de poussée, gauche	1

Élément	Numéro	Nom	Quantité
K	0748-254-006	Douille de la poignée de poussée, droite	1
L	1211-351-010	Ensemble de poignée de poussée	2

Ensemble de poignée de poussée

1211-351-010 rév. A (référence uniquement)

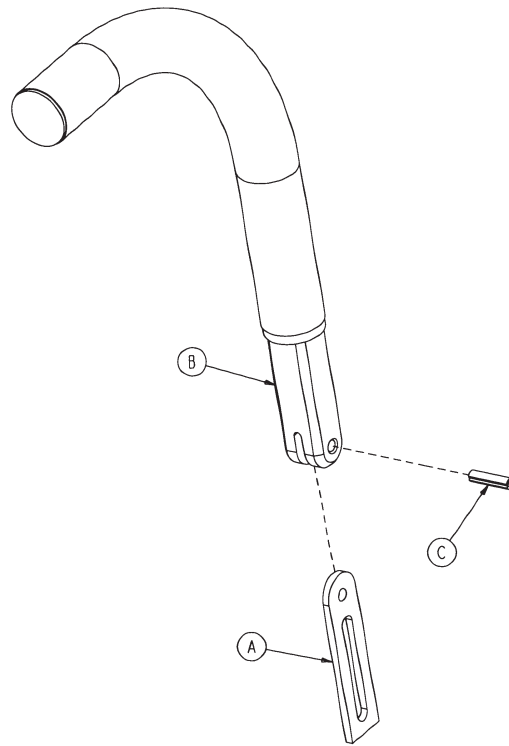


Élément	Numéro	Nom	Quantité
A	1010-354-024	Maillon d'arrêt du P.U.P.	1
B	1211-151-018	Ensemble de gaine P.U.P.	1
C	0026-118-000	Broche à ressort	1

Ensemble de protection d'angle avec poignées de poussée et support de perfusion en deux parties en option

0744-035-025 Rév. A (tête) (référence uniquement)

0744-035-075 Rév. A (pieds) (référence uniquement)

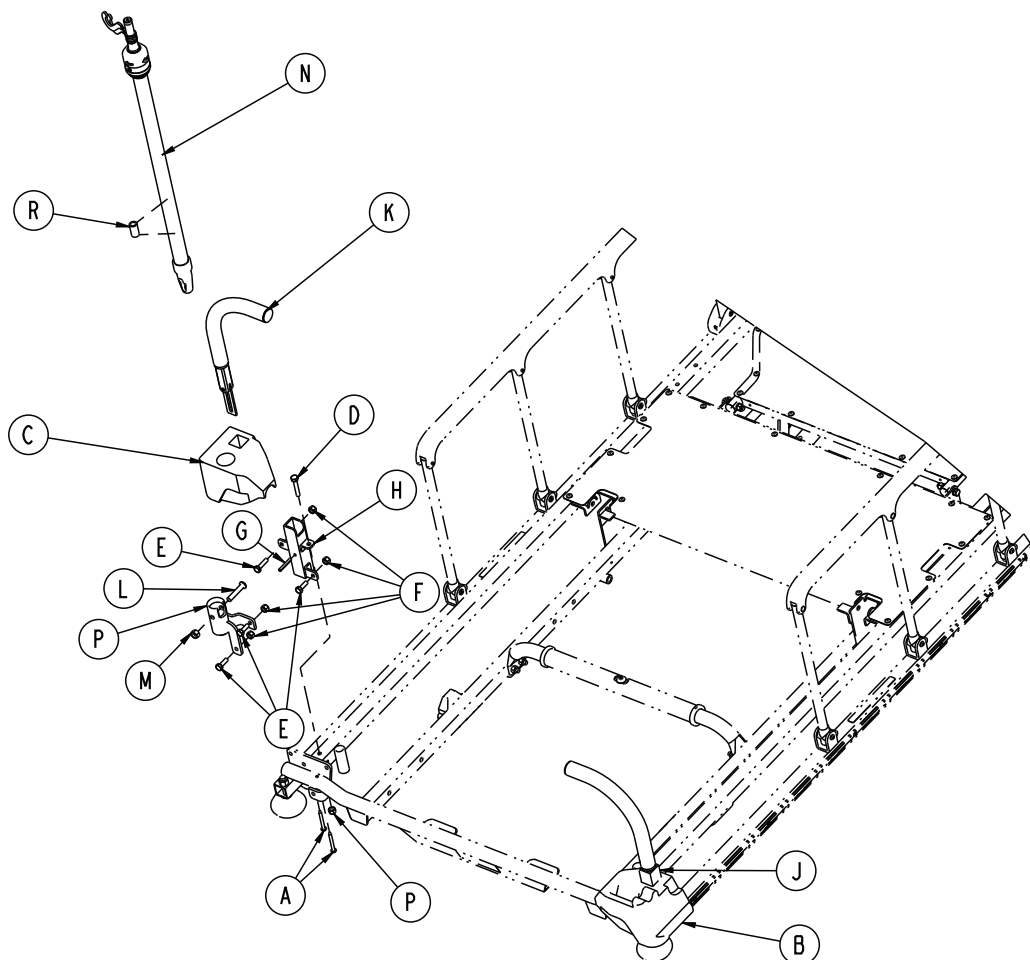


Élément	Numéro	Nom	Quantité
A	0023-283-000	Vis autotaraudeuse	4
B	0742-201-236	Protection d'angle, fente	1
C	0742-201-237	Protection d'angle, trou	1
D	0003-047-000	Vis d'assemblage à tête hexagonale	2
E	0003-050-000	Vis d'assemblage à tête hexagonale	6
F	0016-028-000	Écrou hexagonal Fiberlock	8
G	0026-012-000	Goupille élastique fendue	2
H	0748-254-004	Douille de la poignée de poussée, gauche	1
J	0748-254-006	Douille de la poignée de poussée, droite	1

Élément	Numéro	Nom	Quantité
K	1211-351-010	<i>Ensemble de poignée de poussée</i> (page 82)	2
L	0004-199-000	Vis d'assemblage à tête ronde	1
M	0016-036-000	Écrou hexagonal nylon	1
N	1211-210-010	Ensemble de support de perfusion en trois parties	1
P	0748-259-103	Ensemble soudé de pivot IV	1
R	1001-259-042	Bouchon perfusion	1

Ensemble de protection d'angle avec poignées de poussée et support de perfusion en trois parties

0744-035-035 Rév. A (tête) (référence uniquement)

0744-035-085 Rév. A (pieds) (référence uniquement)

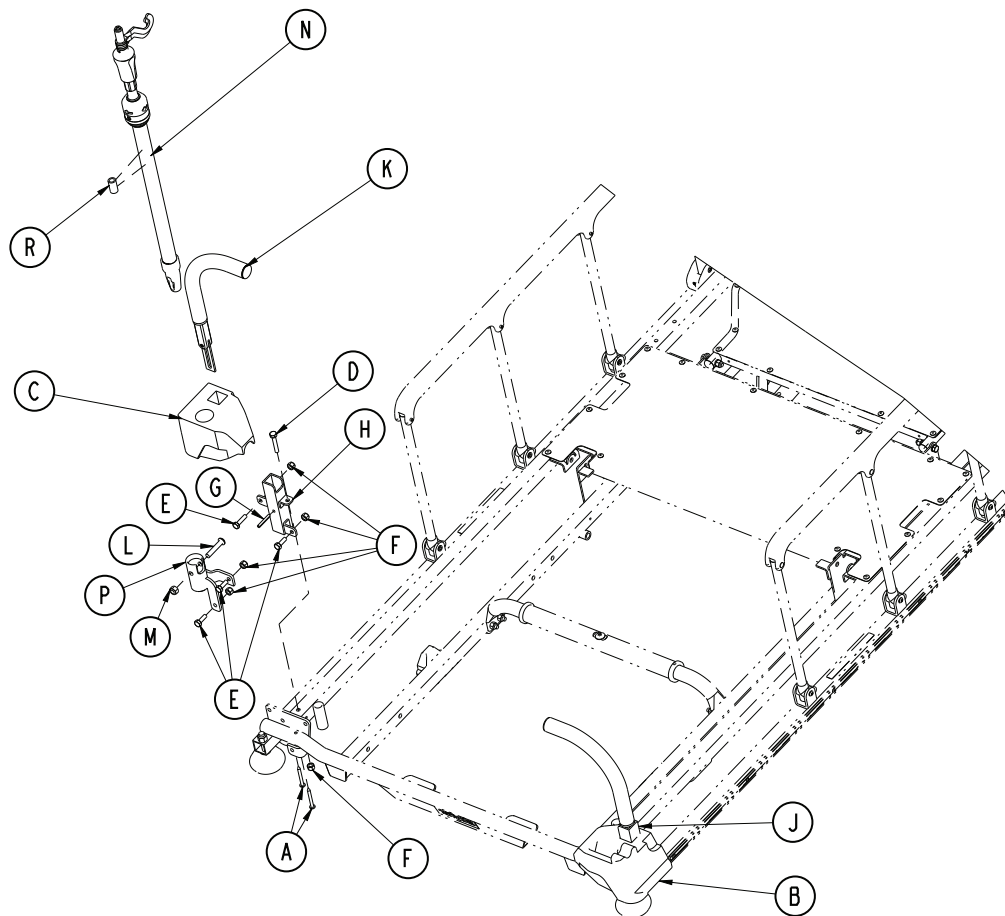


Élément	Numéro	Nom	Quantité
A	0023-283-000	Vis autotaraudeuse	4
B	0742-201-236	Protection d'angle, fente	1
C	0742-201-237	Protection d'angle, trou	1
D	0003-047-000	Vis d'assemblage à tête hexagonale	2
E	0003-050-000	Vis d'assemblage à tête hexagonale	6
F	0016-028-000	Écrou hexagonal Fiberlock	8
G	0026-012-000	Goupille élastique fendue	2
H	0748-254-004	Douille de la poignée de poussée, gauche	1
J	0748-254-006	Douille de la poignée de poussée, droite	1
K	1211-351-010	Ensemble de poignée de poussée (page 82)	2

Élément	Numéro	Nom	Quantité
L	0004-199-000	Vis d'assemblage à tête ronde	1
M	0016-036-000	Écrou hexagonal nylon	1
N	1211-211-010	Ensemble de support de perfusion en trois parties	1
P	0748-259-103	Ensemble soudé de pivot IV	1
R	1001-259-042	Bouchon perfusion	1

Ensemble de protection d'angle avec support de perfusion en deux parties

0744-035-020 Rév. A (tête) (référence uniquement)

0744-035-070 Rév. A (pieds) (référence uniquement)

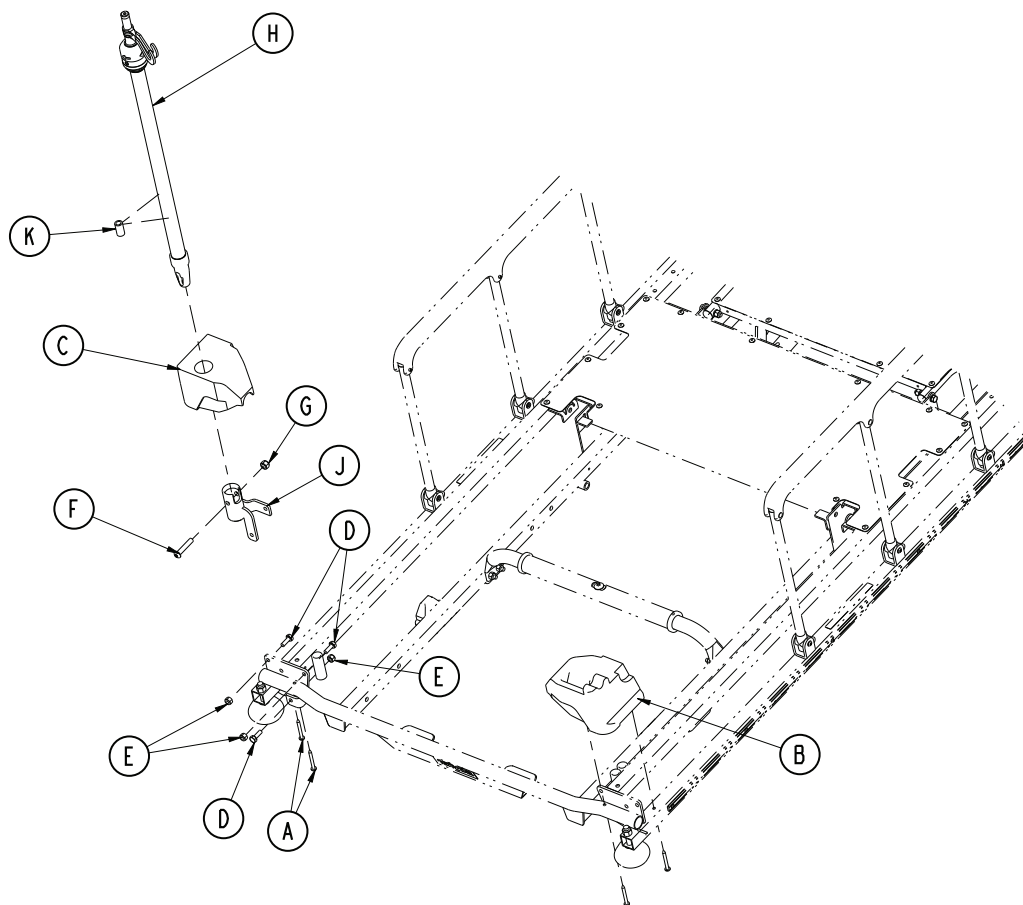


Élément	Numéro	Nom	Quantité
A	0023-283-000	Vis autotaraudeuse	4
B	0742-201-238	Protection d'angle, fente	1
C	0742-201-239	Protection d'angle, trou	1
D	0003-050-000	Vis d'assemblage à tête hexagonale	3
E	0016-028-000	Écrou hexagonal Fiberlock	3
F	0004-199-000	Vis d'assemblage à tête ronde	1
G	0016-036-000	Écrou hexagonal nylon	1
H	1211-210-010	Ensemble de support de perfusion en deux parties	1
J	0748-259-103	Ensemble soudé de pivot IV	1
K	1001-259-042	Bouchon perfusion	1

Ensemble de protection d'angle avec support de perfusion en trois parties

0744-035-030 Rév. A (tête) (référence uniquement)


0744-035-080 Rév. A (pieds) (référence uniquement)

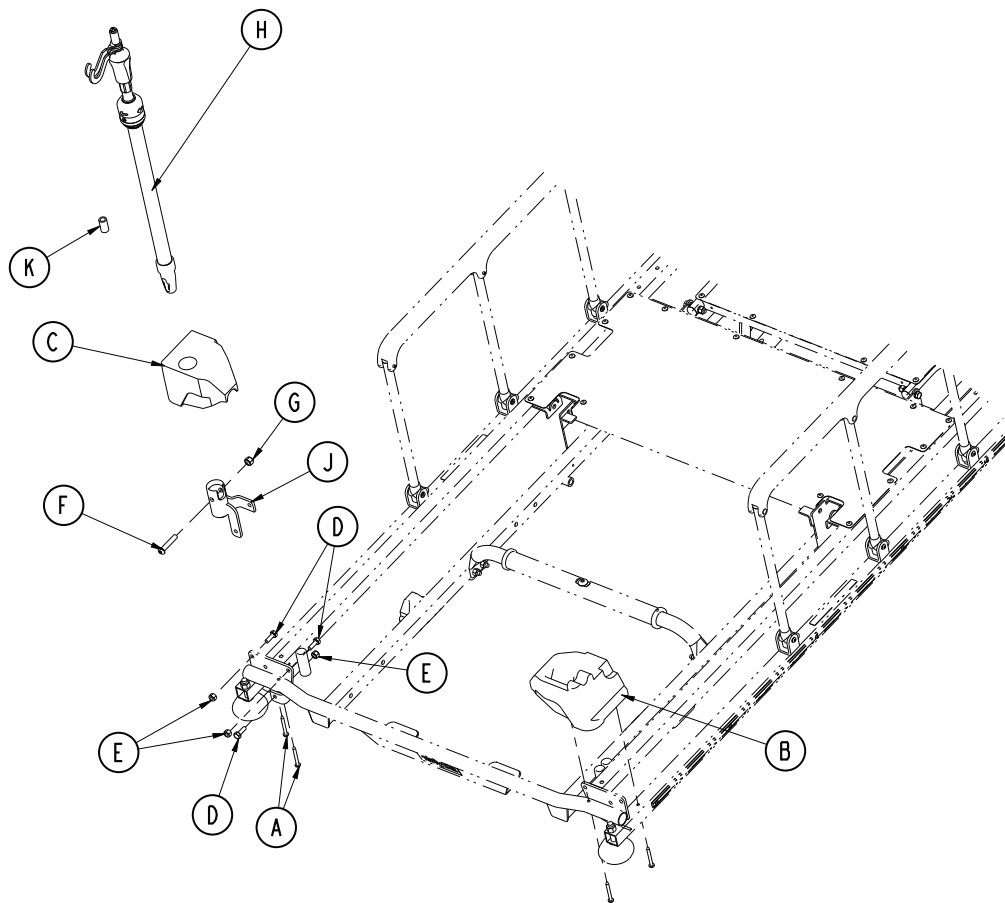

Élément	Numéro	Nom	Quantité
A	0023-283-000	Vis autotaraudeuse	4
B	0742-201-238	Protection d'angle, fente	1
C	0742-201-239	Protection d'angle, trou	1
D	0003-050-000	Vis d'assemblage à tête hexagonale	3
E	0016-028-000	Écrou hexagonal Fiberlock	3
F	0004-199-000	Vis d'assemblage à tête ronde	1
G	0016-036-000	Écrou hexagonal nylon	1
H	1211-211-010	Ensemble de support de perfusion en trois parties	1
J	0748-259-103	Ensemble soudé de pivot IV	1
K	1001-259-042	Bouchon perfusion	1

Ensemble de plateau porte-défibrillateur - 1105-045-200


Rév. B (référence uniquement)

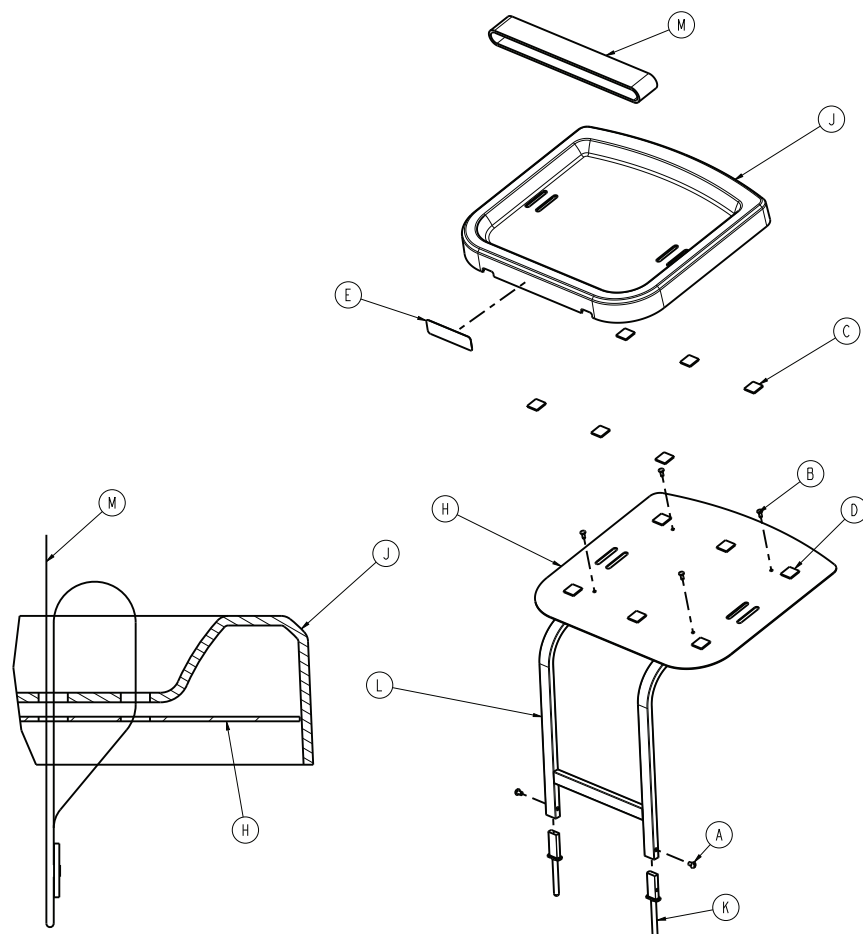

Élément	Numéro	Nom	Quantité
A	0002-044-000	Vis mécanique à tête bombée	2
B	0025-055-000	Rivet pour trou borgne	4
C	0029-008-000	Double verrouillage	6
D	0029-010-000	Double verrouillage	6
E	1105-145-201	Étiquette, plateau porte-défibrillateur	1
H	1105-045-204	Support de plateau	1
J	1105-045-207	Plateau	1
K	0785-045-208	Baïonnette	2
L	1105-045-210	Ensemble soudé du châssis du plateau porte-défibrillateur	1
M	1010-050-021	Sangle longue	1

Plateau porte-défibrillateur/extension pour les pieds/garde-pieds - 1105-045-400

Rév. B (référence uniquement)

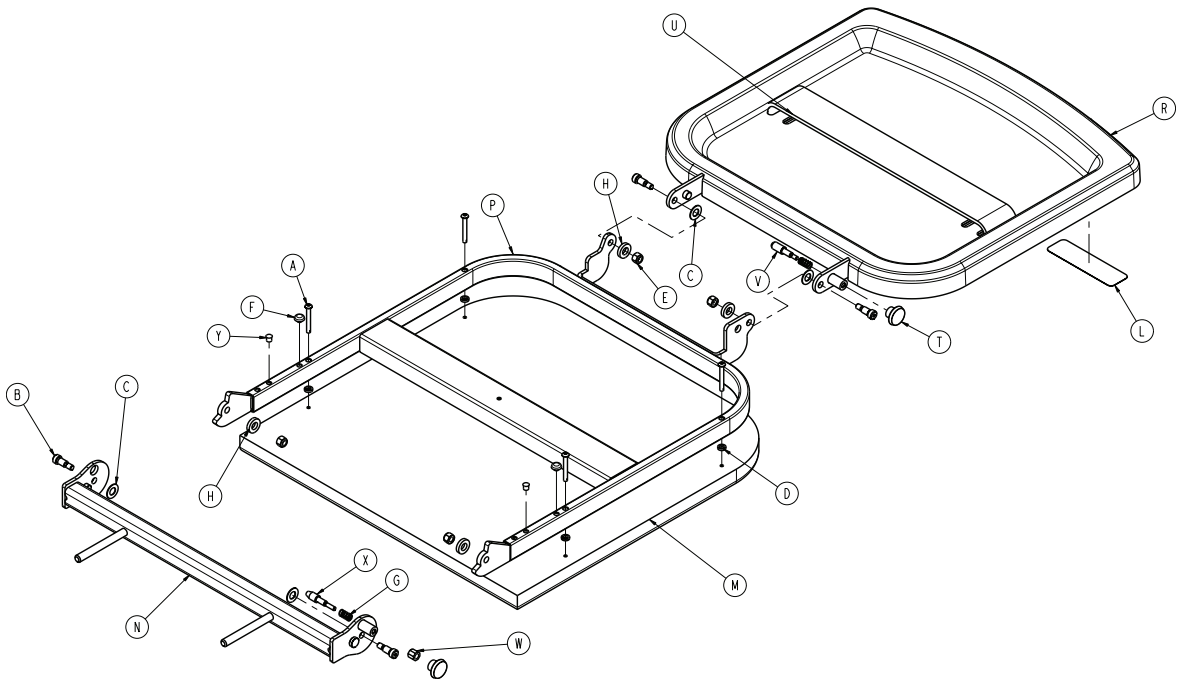


Élément	Numéro	Nom	Quantité
A	0004-215-000	Vis d'assemblage à tête ronde	4
B	0008-049-000	Vis d'assemblage à six pans creux	4
C	0014-020-000	Rondelle	4
D	0014-120-000	Rondelle	4
E	0016-028-000	Écrou hexagonal	4
F	0037-052-000	Pare-chocs en caoutchouc	2
G	0038-133-000	Ressort à compression	2
H	0052-017-000	Entretoise	4
L	1105-145-401	Étiquette, extension pour les pieds/ plateau porte-défibrillateur	1
M	0785-045-405	Coussin	1
N	0785-045-410	Ensemble soudé de montage de la base	1
P	0785-045-420	Ensemble soudé du pivot du châssis	1
R	0747-045-430	Ensemble de plateau	1
T	0785-045-450	Molette	2
U	1010-050-021	Sangle longue	1
V	1010-050-242	Verrouillage de la broche	1
W	1010-050-250	Réglage du verrouillage	1

Élément	Numéro	Nom	Quantité
X	1010-050-248	Verrouillage de la broche inférieure	1
Y	0721-031-065	Bouchon de trou	2

Garde-pieds/porte-dossiers - 1105-045-500


Rév. AA (référence uniquement)

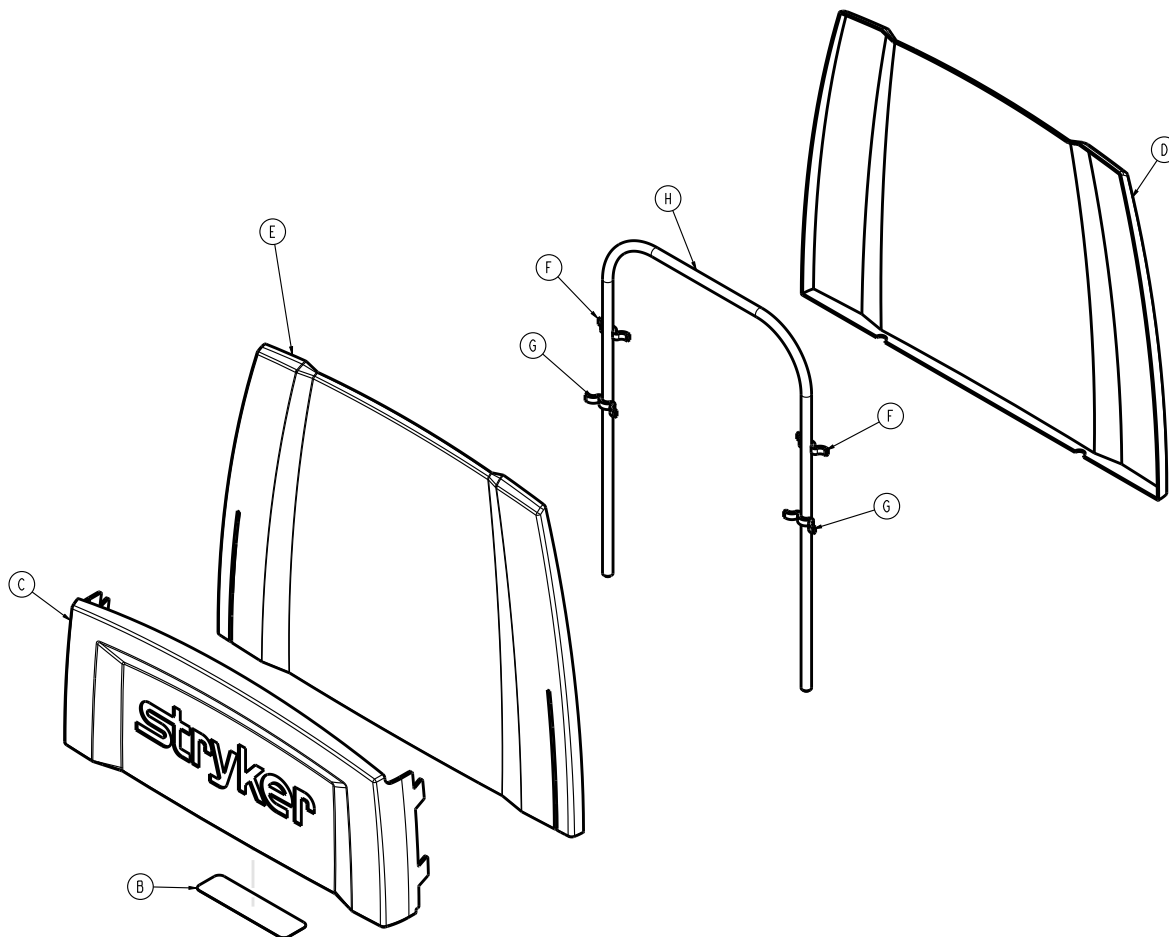

Élément	Numéro	Nom	Quantité
B	1105-045-501	Étiquette, pied de lit	1
C	1105-045-511	Porte-dossiers	1
D	1105-045-512	Face arrière du pied de lit	1
E	1105-045-513	Face avant du pied de lit	1
F	1105-045-514	Petite entretoise	2
G	1105-045-515	Grande entretoise	2
H	0946-029-010	Support	1

Plateau de service - 1105-045-700


Rév. B (référence uniquement)

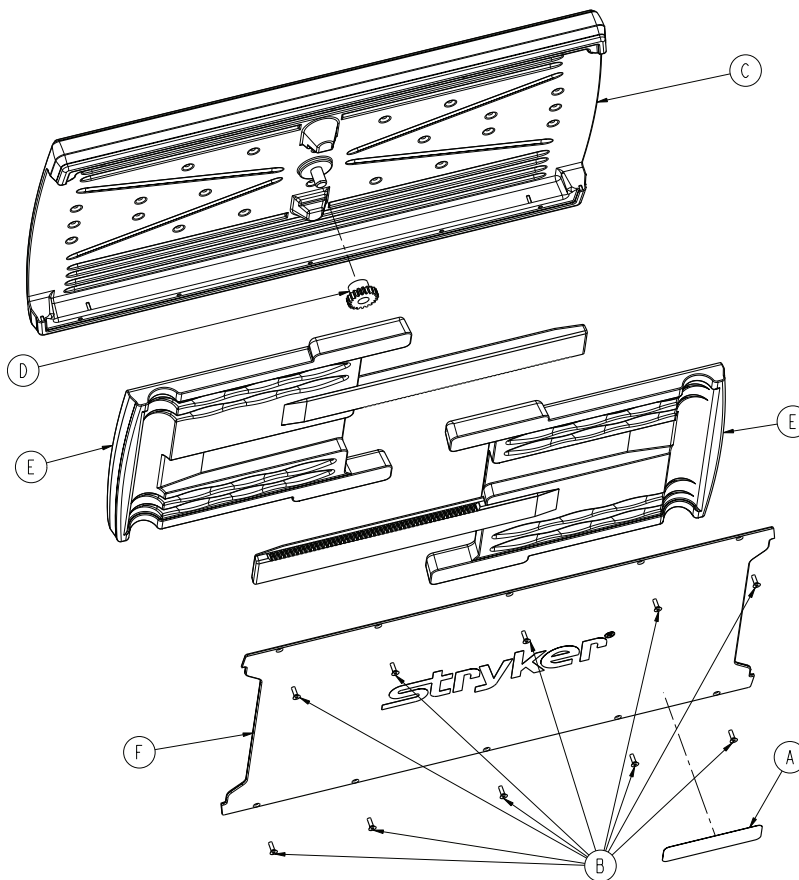

Élément	Numéro	Nom	Quantité
A	1105-145-701	Étiquette, plateau de service	1
B	0785-045-704	Vis Torx à tête plate	10
C	1105-045-705	Haut de plateau de service	1
D	0785-045-706	Poinçon de plateau de service	1
E	1105-045-710	Glissière du plateau de service	2
F	1105-045-715	Couvercle de plateau de service	1

Garde-pieds/porte-plateau de service - 1105-045-800


Rév. B (référence uniquement)

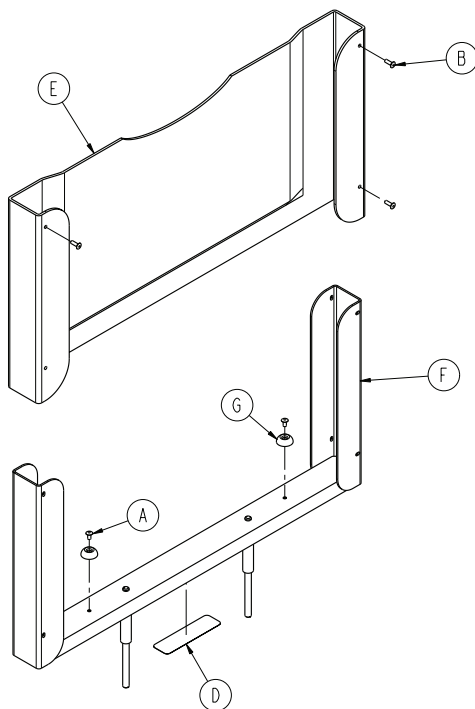

Élément	Numéro	Nom	Quantité
A	0025-079-000	Rivet	2
B	0025-133-000	Rivet	4
D	1105-145-801	Étiquette, support de plateau de service	1
E	1105-045-805	Pied de lit	1
F	1105-045-810	Ensemble soudé du support du pied de lit	1
G	0946-001-155	Pare-chocs	2

Chariot de perfusion - 0785-155-000


Rév. A (référence uniquement)

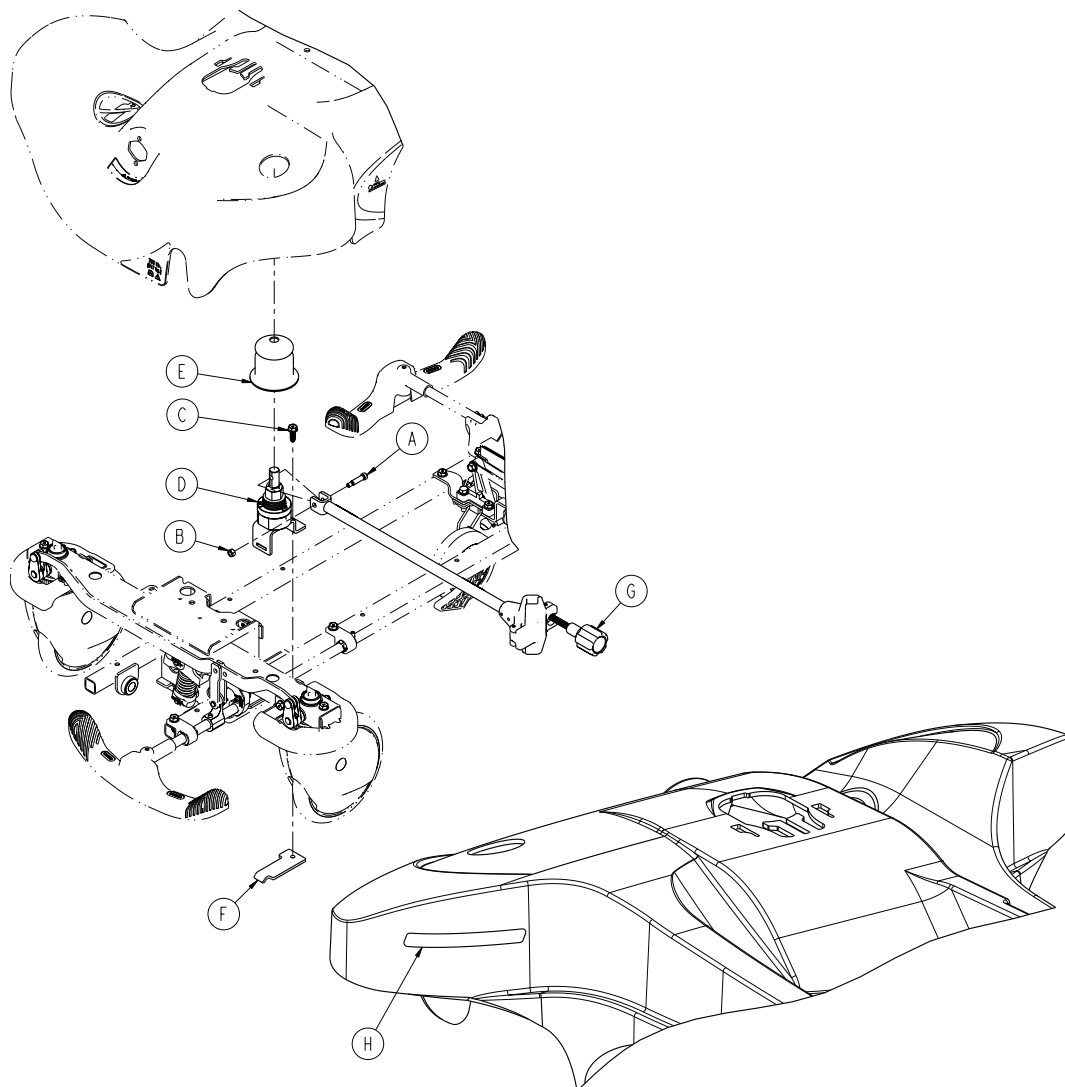

Élément	Numéro	Nom	Quantité
A	0008-006-000	Vis à épaulement à tête creuse	1
B	0016-118-000	Écrou de verrouillage hexagonal	1
C	0023-288-000	Vis à tête hexagonale à embase	1
D	0753-122-001	Ensemble d'embrayage	1
E	0753-122-036	Cloche	1
F	0753-122-103	Plaque pour chariot de perfusion	1
G	1050-091-044	Ensemble de bras	1
H	1105-024-010	Étiquette, stocker correctement	1

Havasu, support de perfusion, amovible - 0390-025-000


Rév. AA (référence uniquement)

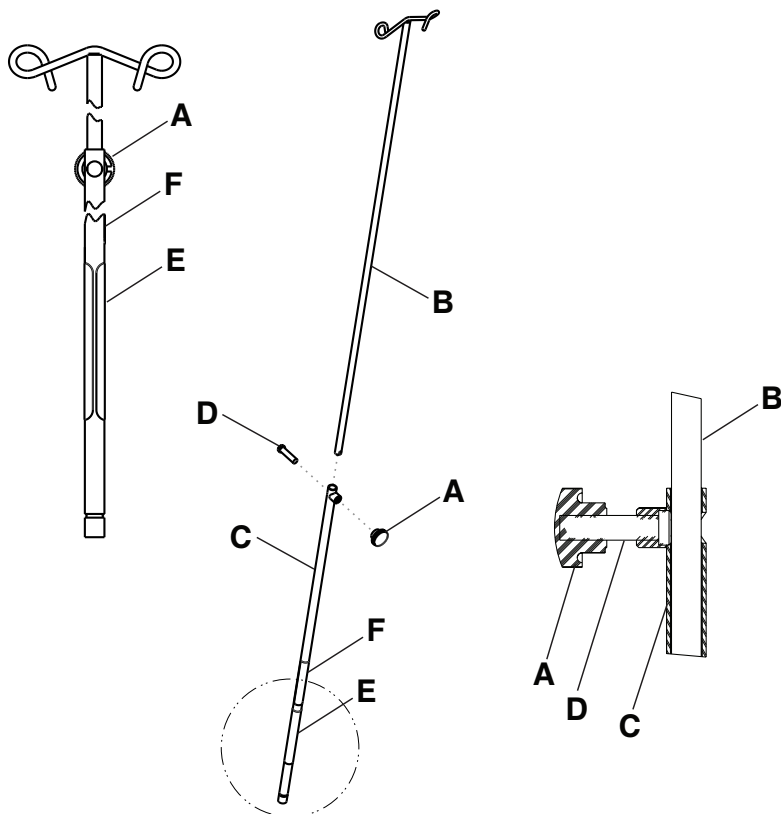

Élément	Numéro	Nom	Quantité
A	0390-003-056	Molette	1
B	0390-003-053	Ensemble IV double	1
C	0393-003-043	Ensemble de tubes en chrome	1
D	0004-496-000	Vis d'assemblage à six pans creux	1
E	0390-125-011	Étiquette, support de perfusion, amovible	1
F	108900350901	Étiquette, EAR	1

Porte-bouteille vertical - 1115-130-000


Rév. B (référence uniquement)

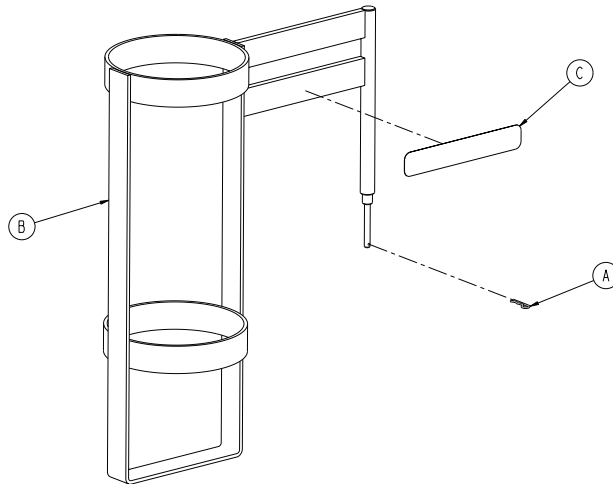

Élément	Numéro	Nom	Quantité
A	0027-030-000	Goupille en épingle à cheveux	1
B	1115-030-111	Support pour bouteille vertical	1
C	1115-130-117	Étiquette, support pour bouteille d'oxygène	1

Ensemble de retenue pour bouteille d'oxygène - 1037-010-090


1037-010-095 Rév. B (référence uniquement)

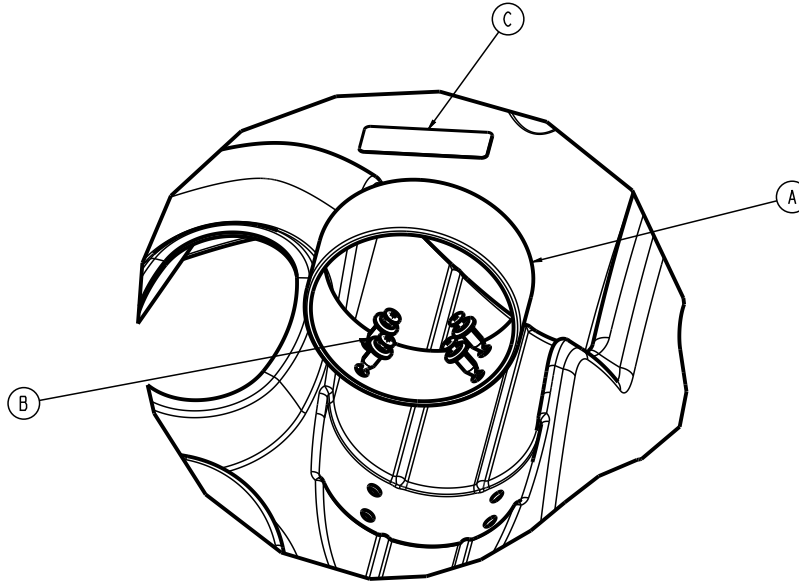

Élément	Numéro	Nom	Quantité
A	0747-010-091	Anneau de retenue de bouteille	1
B	1040-010-092	Ensemble Sculok	4
C	0747-610-901	Étiquette, spécification	1

Sangle de retenue, chevilles - 0946-043-001


Rév. AC (référence uniquement)

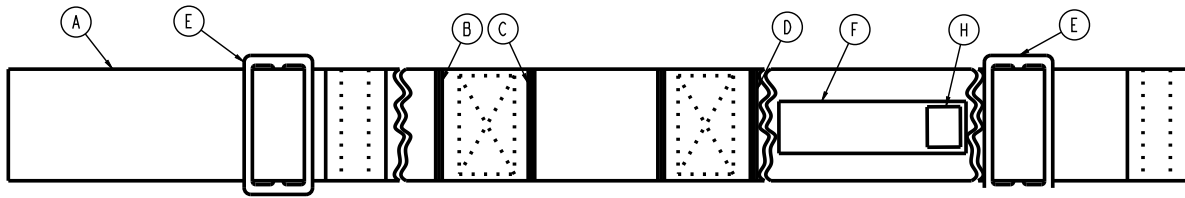

Élément	Numéro	Nom	Quantité
A	7900-001-011	Sangle en nylon	1
B	7900-001-011	Sangle en nylon	2
C	7900-001-101	Partie velours du Velcro®	2
D	7900-001-100	Crochet Velcro®	2
E	0390-057-014	Boucle	2
F	0946-001-085	Étiquette, sangle de retenue pour chevilles	1
H	0036-019-968	Étiquette, symboles de retenue JAC	1

Sangle de retenue pour poitrine - 1010-058-000


Rév. AC (référence uniquement)

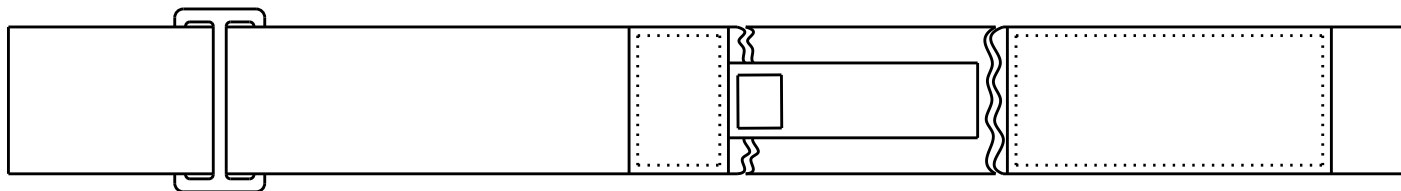

Numéro	Nom
0390-019-001	Sangle de retenue, longue
0390-019-002	Sangle de retenue, courte

Sangle de retenue du poignet - 0946-044-000


Rév. C (référence uniquement)

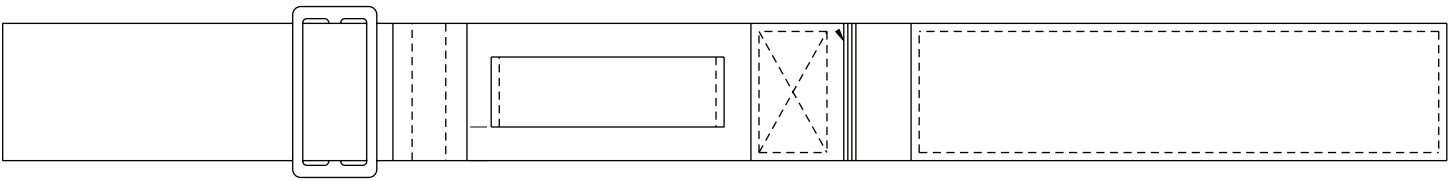

Numéro	Nom
0946-044-001	Sangle de retenue du poignet

Sangle de retenue, corps - 0390-019-000

Rév. AC (référence uniquement)

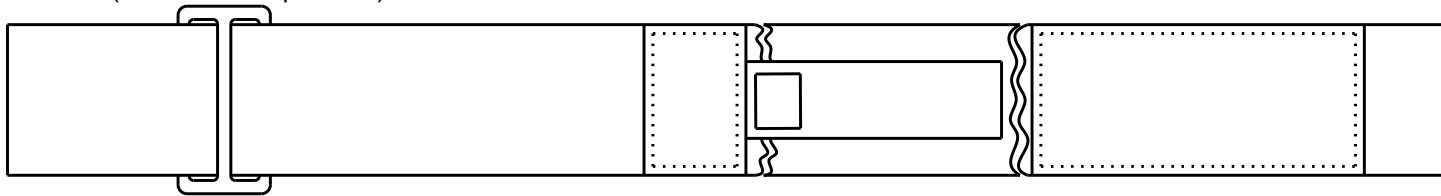

Numéro	Nom
0390-019-001	Sangle de retenue, longue
0390-019-002	Sangle de retenue, courte

Sangle de retenue, ensemble complet - 1010-077-000

Rév. C (référence uniquement)

Numéro	Nom
0390-019-000	Sangle de retenue du corps
0946-043-001	Ensemble de sangle de retenue pour chevilles
0946-044-001	Sangle de retenue du poignet
1010-058-000	Sangle de retenue pour poitrine

Matelas et coussinets de barrière latérale

Enhanced Comfort, 4 po x 26 po (10 cm x 66 cm) 0785-034-623	Ultra Comfort, 4 po x 26 po (10 cm x 66 cm), 0785-034-603	Ultra Comfort, 5 po x 26 po (12,5 cm x 66 cm), 0785-034-633	3 po x 26 po (7,5 cm x 66 cm) standard 1059-326-001
Ultra Comfort, 4 po x 30 po (10 cm x 76 cm), 0785-034-303	Enhanced Comfort, 3 po x 30 po (7,5 cm x 76 cm), 0785-034-313	Enhanced Comfort, 4 po x 30 po (10 cm x 76 cm), 0785-034-323	Ultra Comfort, 5 po x 30 po (12,5 cm x 76 cm), 0785-034-333
ComfortGel SE, sans protection anti-feu, 30 po (76 cm), 1805-034-300	ComfortGel SE, protection anti-feu, 30 po (76 cm), 1805-034-301	Protection anti-feu IsoFlex SE 30 po (76 cm), 1806-034-300	IsoFlex SE, protection anti-feu, 30 po (76 cm), international, 1806-034-301
ComfortGel SE, sans protection anti-feu, 26 po (66 cm), 1805-034-600	ComfortGel SE, protection anti-feu, 26 po (66 cm), 1805-034-601	Ultra Comfort SE 4 po x 26 po (10 cm x 66 cm), 1704-034-600	Ultra Comfort SE 4 po x 26 po (10 cm x 66 cm), 1704-034-601
Ultra Comfort SE 3 po x 30 po (7,5 cm x 76 cm), 1703-034-300	Ultra Comfort SE, 3 po x 30 po (7,5 cm x 76 cm) international 1703-034-301	Ultra Comfort SE 4 po x 30 po (10 cm x 76 cm), 1704-034-300	Ultra Comfort SE 4 po x 30 po (10 cm x 76 cm), international, 1704-034-301
Jeu de coussinets pour barrières latérales		1001-052-000	



Stryker Corporation or its divisions or other corporate affiliated entities own, use or have applied for the following trademarks or service marks: **ComfortGel, Havasu, IsoFlex, Stryker**. All other trademarks are trademarks of their respective owners or holders.



Stryker Medical
3800 E. Centre Avenue
Portage, MI 49002
USA