

## Chaise pour escaliers Stair-PRO

Manuel d'entretien

REF 6251

REF 6252





# Table des matières

Définition de « Avertissement », « Mise en garde » et « Remarque » .....	2
Résumé des mesures de sécurité .....	2
Introduction à l'entretien .....	3
Durée de vie utile prévue .....	3
Coordonnées .....	3
Emplacement du numéro de série .....	3
Entretien préventif .....	4
Fiche d'entretien .....	6
Documentation sur la formation .....	7
Entretien .....	8
Réglage de la force de verrouillage des roues .....	8
Remplacement du siège en vinyle .....	8
Remplacement de la ceinture du guide .....	9
Remise en état de la ceinture du guide .....	11
Remplacement d'une roue arrière .....	13
Remplacement d'une roulette avant .....	13
Remplacement du câble de la poignée de commande supérieure .....	14
Ensemble de chaise .....	16
Ensemble de cadre principal 6251 .....	27
Ensemble de cadre principal 6252 .....	29
Poignée d'extension supérieure .....	32
Ensemble de cadre de guide, ceinture standard .....	33
Mécanisme de verrouillage interne - 6252-001-014 .....	35
Mécanisme de verrouillage interne - 6252-001-015 .....	36
Ensemble de câble et broche .....	37
Ensemble de roue moulée de 6 po .....	38
Poignée relevable verrouillable en option - 6250-031-000 .....	39
Ensemble de tube pour pied .....	40
6251/6252 ensemble repose-pieds à roulette .....	41
6251/6252 poignée de levage inférieure/sans repose-pieds en option - 6250-024-000/6252-028-000 .....	42
6251/6252 poignée de levage inférieure en option - 6250-025-000 .....	43
Ensemble de poignée d'extension, droite .....	44
Ensemble de poignée d'extension, gauche .....	45
6251/6252 repose-pieds en option - 6252-027-000 .....	46
6252 poignée étendue/sans repose-pieds en option - 6252-030-000 .....	47
6252 poignée étendue/repose-pieds en option - 6252-029-000 .....	48
Ensemble de section siège .....	49
Ensemble de poignée relevable .....	50
Ensemble de mécanisme de verrouillage .....	51
6251/6252 option siège en vinyle - 6250-020-000 .....	52
6251/6252 option siège ABS - 6250-021-000 .....	53
Options de siège et de dossier .....	54
6252 options de repose-tête .....	55
Système de retenue, boucles non absorbantes/métalliques en option - 6250-161-000 .....	56
Système de retenue, boucles en polyester/métal en option - 6250-162-000 .....	57
Système de retenue, boucles en polypropylène/plastique en option - 6250-160-000 .....	58
Repose-tête en vinyle en option - 6252-001-140 .....	59
Support de bouteille d'oxygène élastique en option - 6250-140-000 .....	60

# Définition de « Avertissement », « Mise en garde » et « Remarque »

Les termes **AVERTISSEMENT**, **MISE EN GARDE** et **REMARQUE** ont une signification particulière et doivent faire l'objet d'une lecture attentive.

## **AVERTISSEMENT**

Avertit le lecteur d'une situation qui, si elle n'est pas évitée, pourrait entraîner la mort ou des blessures graves. Peut également attirer l'attention sur l'existence potentielle d'effets indésirables graves ou de risques d'accident.

## **MISE EN GARDE**

Avertit le lecteur d'une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, peut causer des blessures mineures ou modérées à l'utilisateur ou au patient ou endommager le matériel en question ou d'autres biens. Couvre notamment les précautions à prendre afin d'assurer l'utilisation sûre et efficace du dispositif et d'éviter les dommages qui pourraient découler de l'usage ou du mésusage du matériel.

**Remarque** - Fournit des informations spécifiques destinées à faciliter l'entretien ou à clarifier des instructions importantes.

## **Résumé des mesures de sécurité**

Toujours lire et respecter scrupuleusement les avertissements et les mises en garde indiqués sur cette page. Tout entretien doit être effectué exclusivement par du personnel qualifié.

---

### **AVERTISSEMENT**

- Ne pas poncer les dents du guide. Une déformation des dents peut entraîner des performances imprévisibles de la chaise, entraînant des blessures pour les opérateurs et/ou l'occupant.
-

# Introduction à l'entretien

Ce manuel vous aide à entretenir le produit Stryker concerné. Lire ce manuel pour entretenir ce produit. Ce manuel ne traite pas du fonctionnement de ce produit. Consulter le manuel d'utilisation pour les instructions d'utilisation. Pour consulter le manuel d'utilisation ou le manuel d'entretien en ligne, aller sur le site <https://techweb.stryker.com/>.

## Durée de vie utile prévue

La chaise-civière **Stair-PRO** a une durée de vie utile prévue de sept ans dans des conditions normales d'utilisation et en respectant la maintenance périodique appropriée.

## Coordonnées

Contactez le service clientèle ou le support technique de Stryker au moyen des coordonnées suivantes : 1-800-327-0770.


Stryker Medical  
3800 E. Centre Avenue  
Portage, MI 49002  
USA

**Remarque** - L'utilisateur et/ou l'occupant doivent signaler tout incident grave lié au produit à la fois au fabricant et à l'autorité compétente de l'État membre de l'Union européenne où l'utilisateur et/ou l'occupant sont établis.

Pour consulter votre mode d'emploi ou votre manuel d'entretien en ligne, consultez <https://techweb.stryker.com/>.

Avoir le numéro de série (A) du produit Stryker à disposition avant d'appeler le service clientèle ou le support technique de Stryker. Inclure le numéro de série dans toutes les communications écrites.

## Emplacement du numéro de série

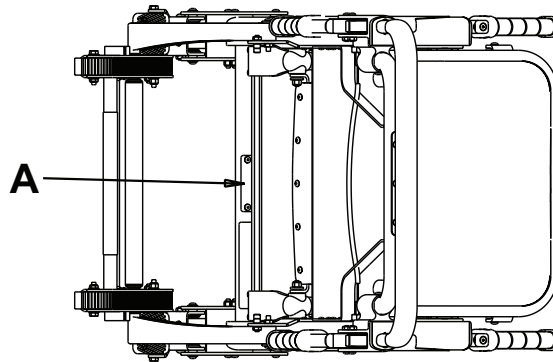

# Entretien préventif

Mettre le produit hors service avant d'effectuer l'inspection d'entretien préventif. Vérifier tous les éléments mentionnés pendant l'entretien préventif annuel pour tous les produits Stryker Medical. Il peut être nécessaire d'effectuer les vérifications d'entretien préventif plus fréquemment en fonction du degré d'utilisation du produit. Toute réparation doit être effectuée exclusivement par du personnel qualifié.

**Remarque** - Nettoyer et désinfecter l'extérieur de la surface de support avant inspection, le cas échéant.

Fonctionnement	Calendrier	Procédure
Nettoyage et désinfection	Chaque utilisation	Voir la rubrique <i>Nettoyage</i> dans le manuel d'utilisation
Inspection	Pour 1 à 25 appels par mois, inspecter la chaise tous les 6 mois	Voir la liste de contrôle ci-dessous
	Pour 26 à 200 appels par mois, inspecter la chaise tous les 3 mois	
	Pour plus de 201 appels par mois, inspecter la chaise tous les mois	
Remise en état de la ceinture du système <b>Stair-TREAD</b> (Modèle 6252)	Après l'utilisation sur environ 500 escaliers, ou si la performance du système <b>Stair-TREAD</b> est lente	Voir la section <i>Remise en état de la ceinture du guide</i> dans le manuel de maintenance

Inspecter les éléments suivants :

- \_\_\_\_\_ Toutes les attaches sont solidement fixées (consulter tous les schémas de montage)
- \_\_\_\_\_ Toutes les soudures sont intactes, absence de fissures ou de cassures
- \_\_\_\_\_ Les tubulures et les feuilles de métal ne sont ni pliées ni cassées
- \_\_\_\_\_ Absence de débris dans les roues
- \_\_\_\_\_ Toutes les roues sont solidement fixées et roulent
- \_\_\_\_\_ Les roulettes avant sont solidement fixées, roulent et pivotent (le cas échéant)
- \_\_\_\_\_ Les blocages de roue maintiennent solidement les roues quand ils sont activés et les libèrent quand ils sont désactivés
- \_\_\_\_\_ La chaise se déplie et se verrouille
- \_\_\_\_\_ Le siège et le relève-buste ne présentent ni déchirure ni fissure
- \_\_\_\_\_ Les sangles de retenue sont intactes et fonctionnent
- \_\_\_\_\_ Les poignées de support côté pieds se déploient et se verrouillent en place
- \_\_\_\_\_ Les poignées de support côté tête se plient et se déplient
- \_\_\_\_\_ La poignée de commande supérieure se déploie et se verrouille dans toutes les positions
- \_\_\_\_\_ Le mécanisme du système **Stair-TREAD** se déplie et se verrouille en place (le cas échéant)
- \_\_\_\_\_ La ceinture du système **Stair-TREAD** s'enroule (le cas échéant)
- \_\_\_\_\_ Les cordons internes de la ceinture du système **Stair-TREAD** ne sont pas visibles ; remplacer si nécessaire (le cas échéant)
- \_\_\_\_\_ Le système **Stair-TREAD** fonctionne comme souhaité ; remettre les ceintures en état si nécessaire (le cas échéant)
- \_\_\_\_\_ Absence de lubrifiant sur les ceintures du système **Stair-TREAD** ou sur les surfaces du cadre du guide
- \_\_\_\_\_ Le câble de la poignée de déblocage supérieure n'est pas usé ni effiloché ; le remplacer si nécessaire (modèle 6252)
- \_\_\_\_\_ Les accessoires et les pièces sont intacts et fonctionnent

Numéro de série du produit :
Effectué par :
Date :







# Entretien

## Réglage de la force de verrouillage des roues

### Outils requis :

- Clé hexagonale de 5/32 po
- Clé mixte ou douille de 7/16 po

### Procédure :

1. À l'aide d'une clé hexagonale de 5/32 po et d'une clé mixte de 7/16 po ou d'une douille, retirer la vis à tube du centre de la pédale de verrouillage. Conserver la vis. Le blocage de roue est initialement assemblé avec la pédale réglée sur la force de verrouillage minimale. Le repère sur la pédale (A) est aligné avec le repère sur la gaine octogonale (B) (Figure 1).
2. Retirer la gaine octogonale (B). Tourner la gaine octogonale dans le sens antihoraire pour augmenter la force de verrouillage de la pédale et dans le sens horaire pour la diminuer. Insérer la gaine octogonale dans la pédale.
3. À l'aide d'une clé hexagonale de 5/32 po et d'une clé mixte ou d'une douille de 7/16 po, réinstaller la vis à douille (retirée à l'étape 1).
4. Tester la force de verrouillage de la pédale et s'assurer que la pédale est maintenue avant de remettre le produit en service.

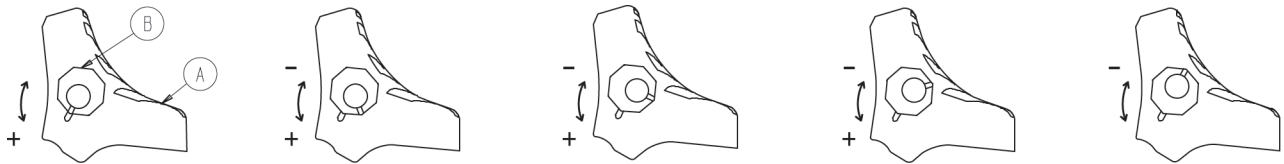


Figure 1 – Réglage de la force de verrouillage des roues

## Remplacement du siège en vinyle

### Outils requis :

- Aucun

### Procédure :

1. Placer la section siège sur le cadre, l'enrouler autour du tube du siège et placer les fentes dans la section siège sur les clips situés sur la face inférieure du tube du siège (Figure 2). S'assurer que le côté « brillant » du siège est à l'intérieur.



Figure 2 – Section siège du siège en vinyle

2. Incliner la chaise sur le dos pour permettre l'accès au bas du tube du siège.
3. Insérer les deux extrémités de la sangle avant dans les boucles de la section siège.

4. Enfiler l'extrémité de la sangle arrière dans la boucle et la tirer pour la serrer.
5. Basculer la chaise vers le haut sur les roues porteuses.
6. Enrouler la section arrière autour du tube arrière (Figure 3).



**Figure 3 – Partie arrière du siège en vinyle**

7. Insérer les deux extrémités de la sangle supérieure dans les boucles de la section arrière.
8. Enfiler l'extrémité de la sangle inférieure dans la boucle et la tirer pour la serrer.
9. S'assurer du fonctionnement correct du produit avant de le remettre en service.

## Remplacement de la ceinture du guide

### Outils requis :

- (2) Clé de 7/16 po
- Clé hexagonale de 3/16 po
- Clé de 1/2 po
- Clé hexagonale de 5/32 po

### Procédure :

1. À l'aide d'une clé de 7/16 po et d'une clé hexagonale de 3/16 po, retirer la vis d'assemblage à six pans creux, l'écrou et la rondelle du support de guide sur un seul côté de la chaise (Figure 4).




**Figure 4 – Retirer la vis, l'écrou et la rondelle**



**Figure 5 – Retourner la chaise**

2. Retourner la chaise à l'envers pour qu'elle repose sur le châssis du siège et le châssis du dossier (Figure 5).
3. À l'aide d'une clé de 1/2 po et d'une clé hexagonale de 3/16 po, retirer la vis d'assemblage à tête ronde, l'écrou, les entretoises et la roue du cadre du même côté que les pièces retirées à l'étape 1 (Figure 6).

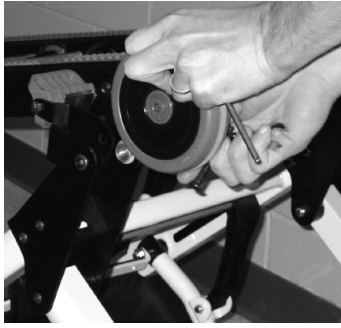


**Figure 6 – Retirer l'ensemble de roue**




**Figure 7 – Retirer les pivots de l'entretoise du guide**

4. À l'aide d'une clé hexagonale de 5/32 po, retirer les deux vis d'assemblage à tête ronde des pivots de l'entretoise du guide et retirer les pivots (Figure 7).
5. À l'aide de deux clés de 7/16 po, retirer la vis d'assemblage à tête hexagonale, l'écrou et les rondelles des deux galets de guidage du côté tête pour retirer les galets (Figure 8).

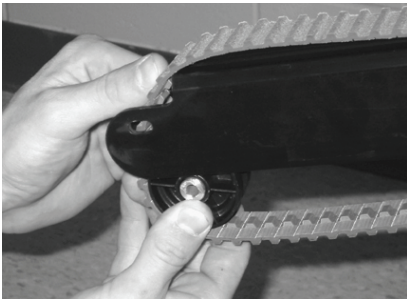


**Figure 8 – Retirer les galets**

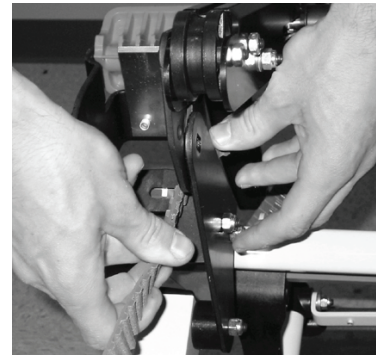

**Figure 9 – Retirer les ceintures usées**

6. Retirer les ceintures en les enfilant dans la plaque de support des roues du côté où les pièces ont été retirées (Figure 9).
7. Enfiler les nouvelles ceintures dans la plaque de support des roues (Figure 10).

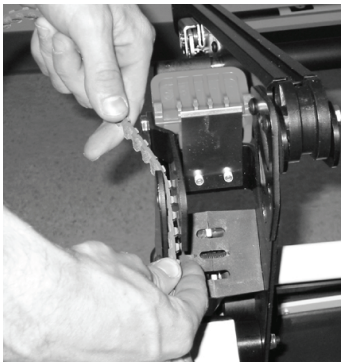

**Figure 10 – Fixer la nouvelle ceinture de guide**



**Figure 11 – Utiliser des clés pour appliquer une tension sur les ceintures**

8. Remplacer les galets de guidage, les rondelles, les vis d'assemblage à tête hexagonale et les écrous (Figure 11).
9. Utiliser deux clés de 7/16 po pour appliquer la tension souhaitée à chaque ceinture et bien serrer (Figure 12).

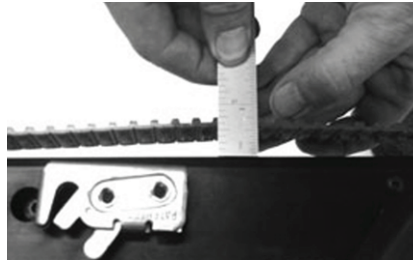


Figure 12 – Tension adéquate de la ceinture

**Remarque** - Pour vérifier la tension, tirer sur le centre de la ceinture jusqu'à ce qu'elle soit tendue. L'écart entre la ceinture et le cadre du guide doit mesurer entre 3/8 po et 1 po.

10. Faire tourner les ceintures pour s'assurer qu'elles roulent librement.
11. S'assurer du fonctionnement correct du produit avant de le remettre en service.

## Remise en état de la ceinture du guide

### Outils requis :

- (2) Clés de 7/16 po
- Marqueur permanent
- Papier de verre grain 50
- Bloc de ponçage

### Procédure :

1. Déployer la poignée de commande supérieure, ouvrir les rails du système **Stair-TREAD** et incliner la chaise vers l'avant jusqu'à ce qu'elle repose sur la poignée et la section siège (Figure 13).
2. À l'aide de deux clés de 7/16 po, retirer le boulon à tête hexagonale, l'écrou hexagonal, deux rondelles, l'entretoise et la roue des deux côtés du cadre du guide. Retirer la roue et l'entretoise vers le bas en direction du sol (Figure 14). Conserver toutes les pièces.



Figure 13 – Incliner la chaise vers l'avant

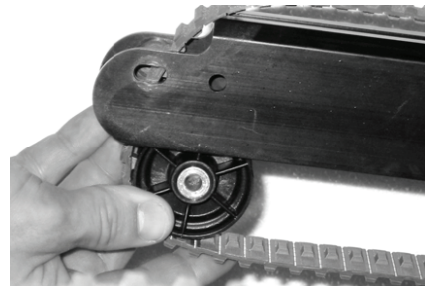


Figure 14 – Retirer l'entretoise de la roue en direction du sol

3. Retourner les deux ceintures de sorte que les petites dents internes soient à l'extérieur. Placer les ceintures sur le cadre du guide pour les soutenir pendant le ponçage.

**Remarque** - Les nouvelles ceintures de guide doivent être installées si les cordons internes sont exposés sur les surfaces d'usure.


4. Pour une référence de point de début/fin, utiliser un marqueur permanent pour colorer une dent sur la ceinture (Figure 15).




**Figure 15 – Marquer une dent de ceinture comme référence**

5. À l'aide d'un bloc de ponçage avec du papier de verre grain 50, poncer les deux surfaces d'usure sur les bords extérieurs de chaque ceinture. L'objectif est de rendre la surface de la ceinture suffisamment rugueuse pour éliminer les taches brillantes causées par l'usure normale. Ne pas poncer excessivement les ceintures (Figure 16 et Figure 17).

**AVERTISSEMENT** - Ne pas poncer les dents du guide. Une déformation des dents peut entraîner des performances imprévisibles de la chaise, entraînant des blessures pour les opérateurs et/ou l'occupant.

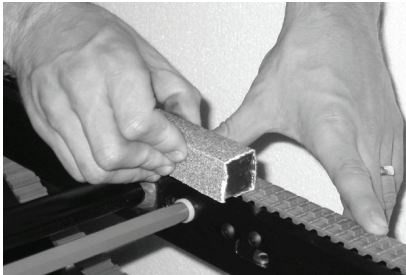

**Figure 16 – Ponçage des surfaces d'usure**

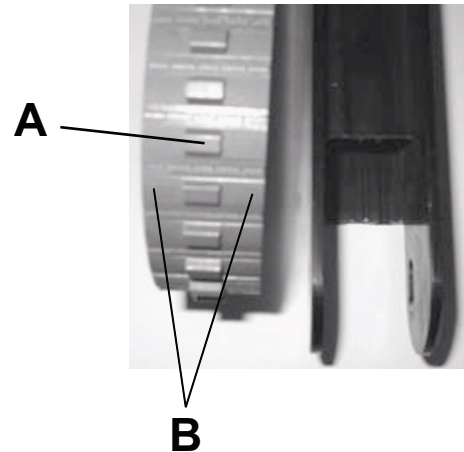

**Figure 17 – Surfaces de ponçage de la ceinture**

**A** : Ne pas poncer les dents du guide

**B** : Surfaces de ponçage de la ceinture

6. Retirer tous les débris de ponçage des ceintures et du cadre du guide.
7. Retourner les deux ceintures de sorte que les grandes dents soient à l'extérieur.
8. À l'aide de deux clés de 7/16 po, remplacer le boulon à tête hexagonale, l'écrou hexagonal, deux rondelles, l'entretoise et la roue des deux côtés du cadre du guide.
9. Utiliser deux clés de 7/16 po pour appliquer la tension souhaitée à chaque ceinture et bien serrer (Figure 18).

**Remarque** - Pour vérifier la tension, tirer sur le centre de la ceinture jusqu'à ce qu'elle soit tendue. L'écart entre la ceinture et le cadre du guide doit mesurer entre 3/8 po et 1 po (Figure 19).

10. Faire tourner les ceintures pour s'assurer qu'elles roulent librement.



Figure 18 – Utiliser des clés pour appliquer une tension sur la ceinture

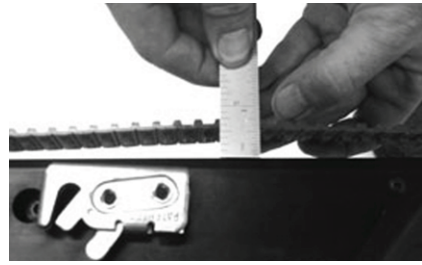


Figure 19 – Tension adéquate de la ceinture

11. S'assurer du fonctionnement correct du produit avant de le remettre en service.

## Remplacement d'une roue arrière

### Outils requis :

- Clé de 1/2 po
- Clé hexagonale de 3/16 po

### Procédure :

1. Retourner la chaise à l'envers pour qu'elle repose sur le châssis du siège et le châssis du dossier (Figure 20).



Figure 20 – Retourner la chaise

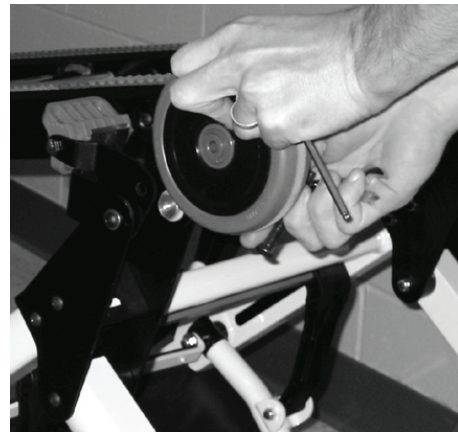


Figure 21 – Retirer l'ensemble de roue

2. À l'aide d'une clé de 1/2 po et d'une clé hexagonale de 3/16 po, retirer la vis d'assemblage à tête ronde, l'écrou, les entretoises et la roue du châssis. Jeter la vis d'assemblage et l'écrou (Figure 21).
3. À l'aide des attaches fournies, fixer la roue fournie au châssis.
4. Répéter les étapes pour l'autre roue, si nécessaire.
5. S'assurer du fonctionnement correct du produit avant de le remettre en service.

## Remplacement d'une roulette avant

### Outils requis :

- Clé mixte de 3/4 po
- Clé hexagonale de 3/8 po avec extrémité sphérique

### Procédure :

1. Poser la chaise sur le dos.
2. À l'aide d'une clé mixte de 3/4 po et d'une clé hexagonale de 3/8 po avec extrémité sphérique, retirer l'écrou hexagonal Nylock (A) qui permet de fixer l'ensemble de roulette (B) à la section pieds (C) (Figure 22). Jeter la roulette et l'écrou.

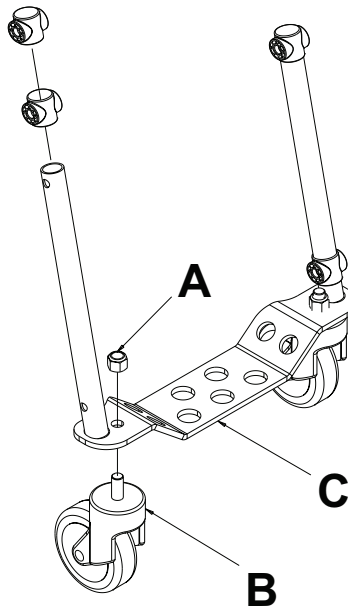


Figure 22 – Retrait de la roulette

3. Inverser les étapes pour installer la roulette fournie et l'écrou hexagonal Nylock fourni.
4. S'assurer du fonctionnement correct du produit avant de le remettre en service.

## Remplacement du câble de la poignée de commande supérieure

### Outils requis :

- Clé de 5/8 po


### Procédure :

1. Tirer le câble et élever la poignée de commande supérieure extensible en position complètement déployée (Figure 23).
2. À l'aide d'une clé de 5/8 po, retirer un côté du câble (Figure 24).






**Figure 23 – Élever la poignée de commande supérieure extensible**

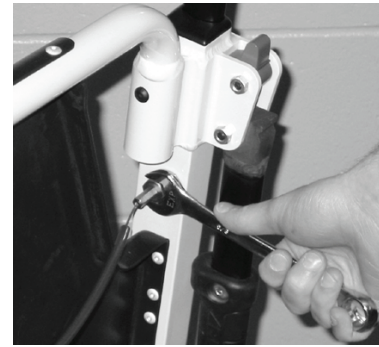

**Figure 24 – Retirer un côté du câble**

3. Placer la rondelle à l'extrémité du nouveau câble (Figure 25).
4. À l'aide d'une clé de 5/8 po, fixer un côté du nouveau câble au châssis de la chaise dans le trou où l'ancien câble a été retiré (Figure 26).

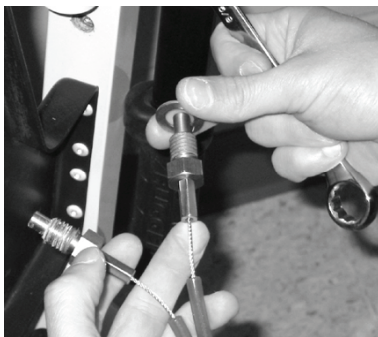

**Figure 25 – Placer la rondelle sur le nouveau câble**





**Figure 26 – Fixer un côté du nouveau câble**


5. Répéter les étapes 2 à 4 pour l'autre extrémité du câble.
6. S'assurer du fonctionnement correct du produit avant de le remettre en service.

# Ensemble de chaise


6250-001-005 rév. AA (référence uniquement)

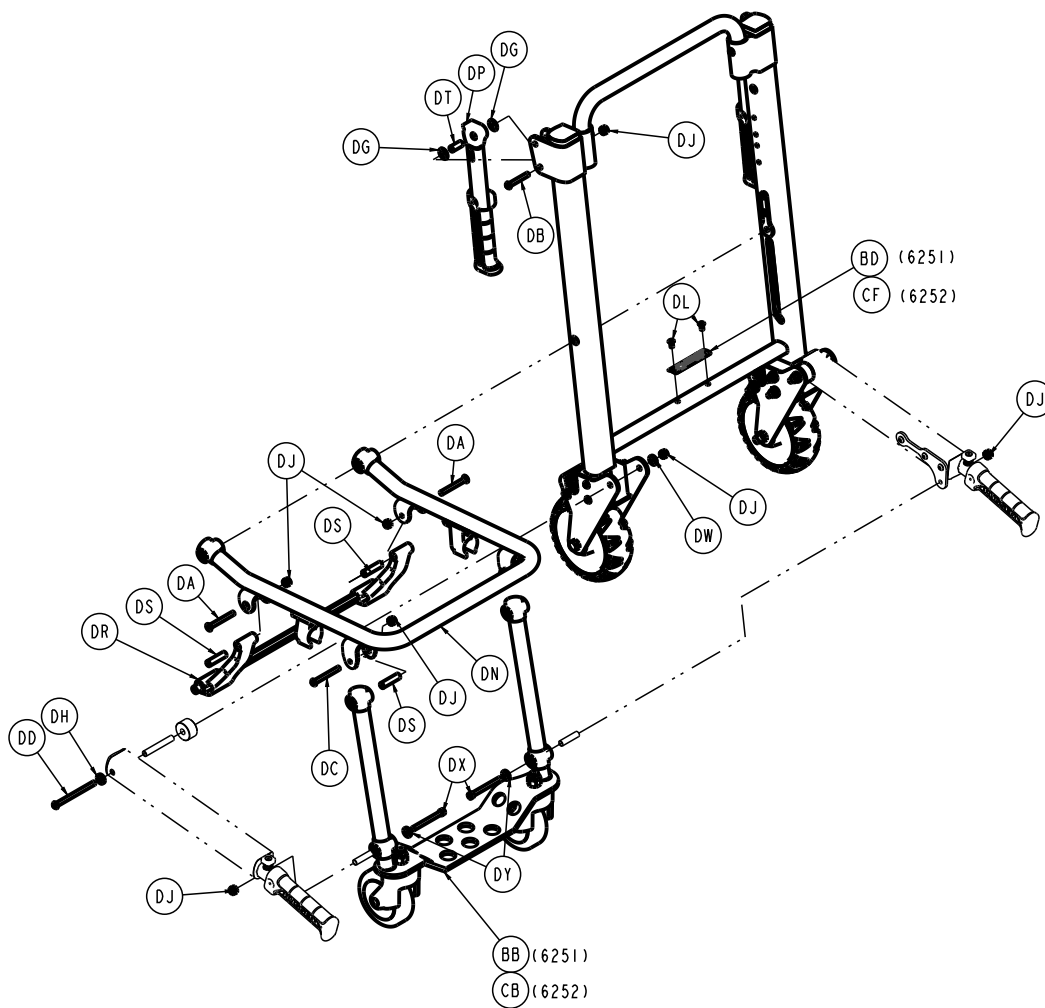



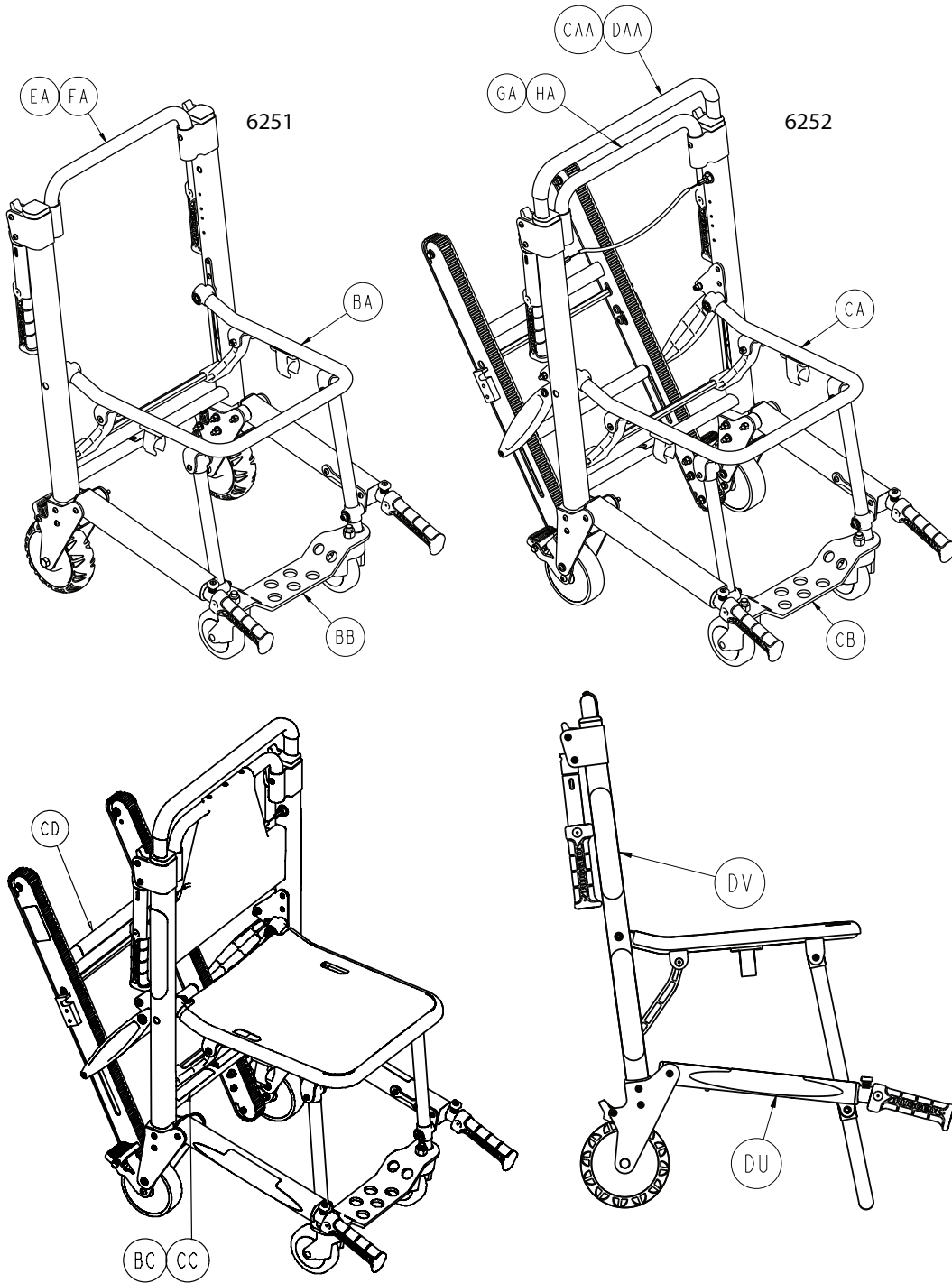



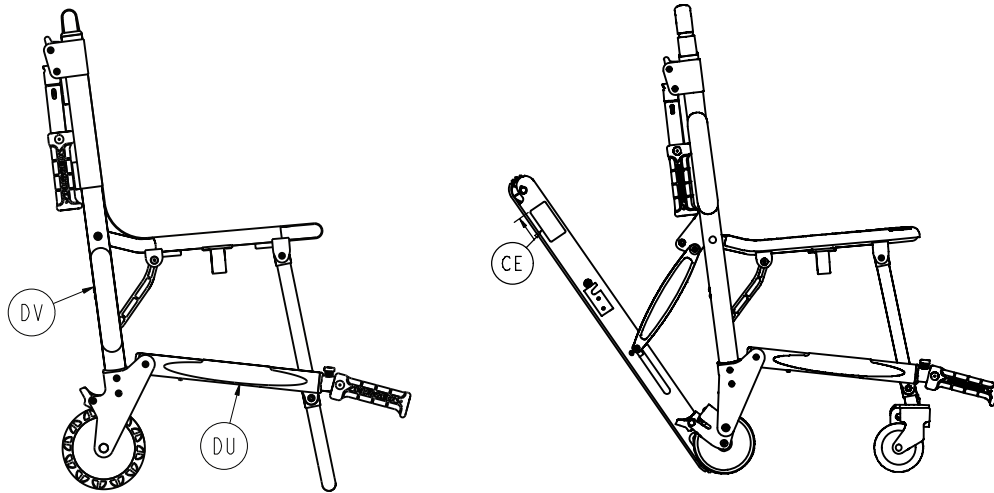



(639000010901)

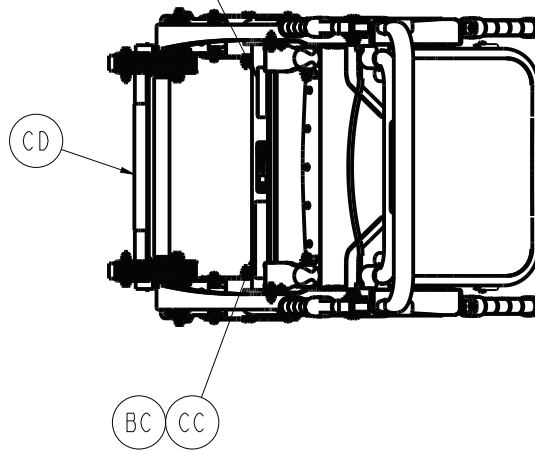

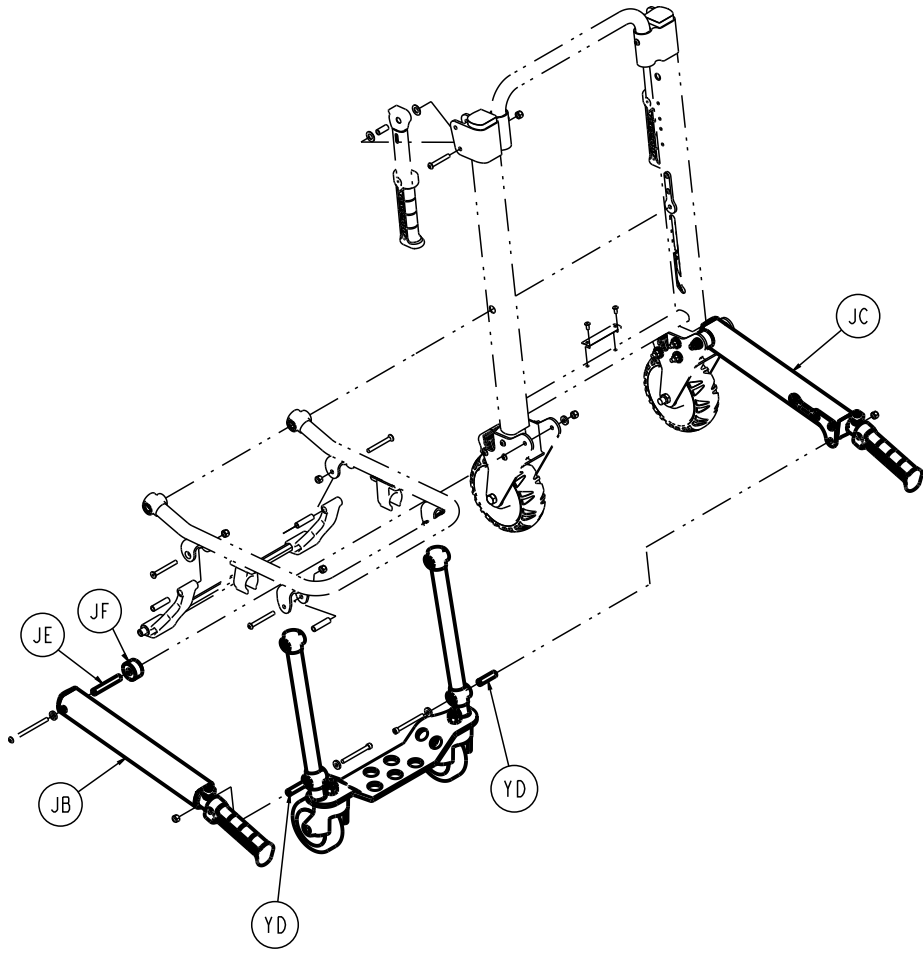


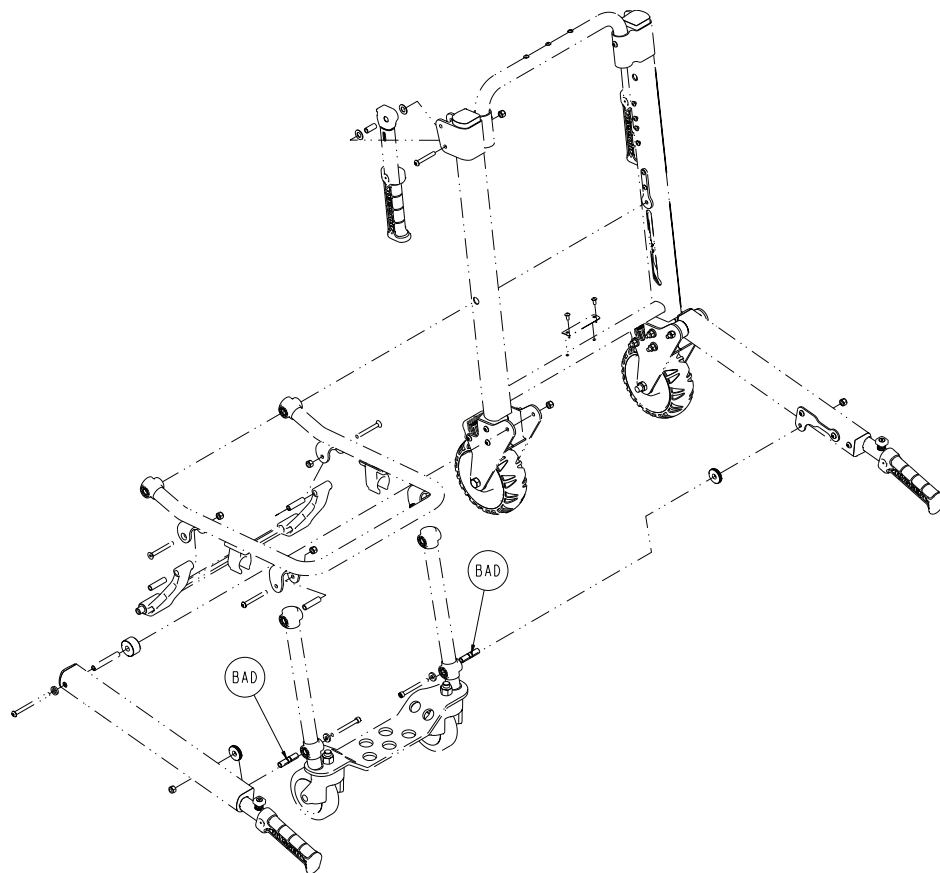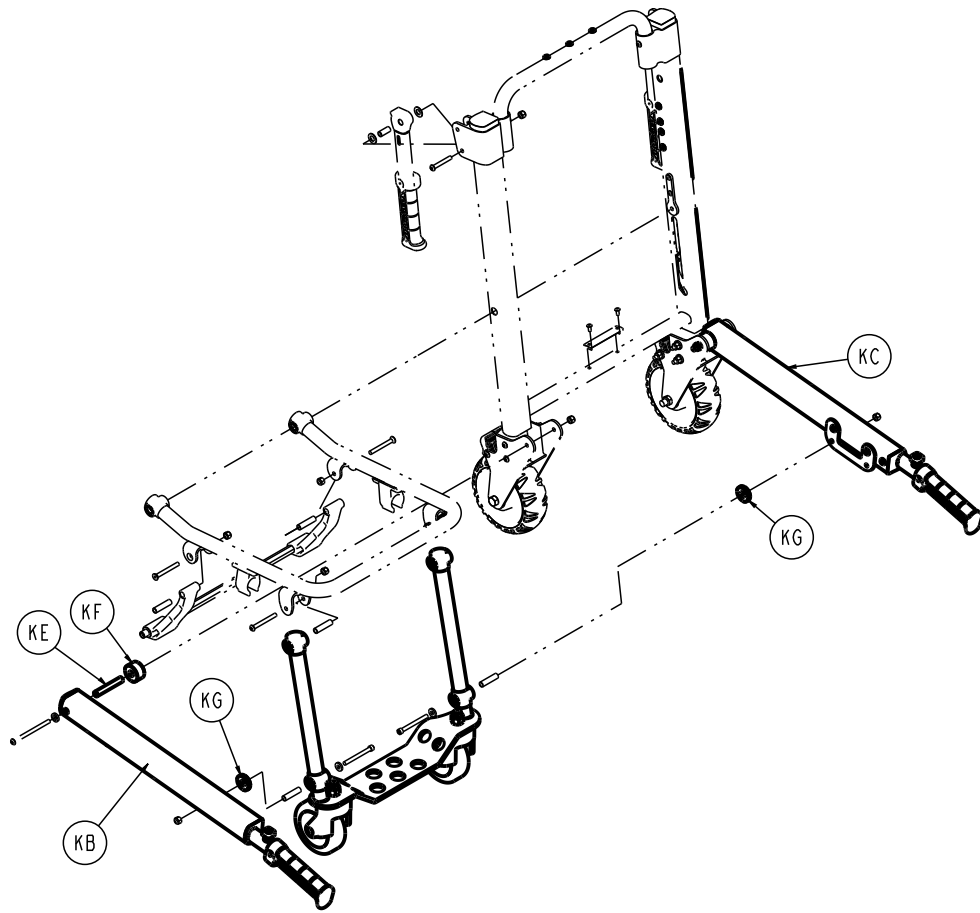


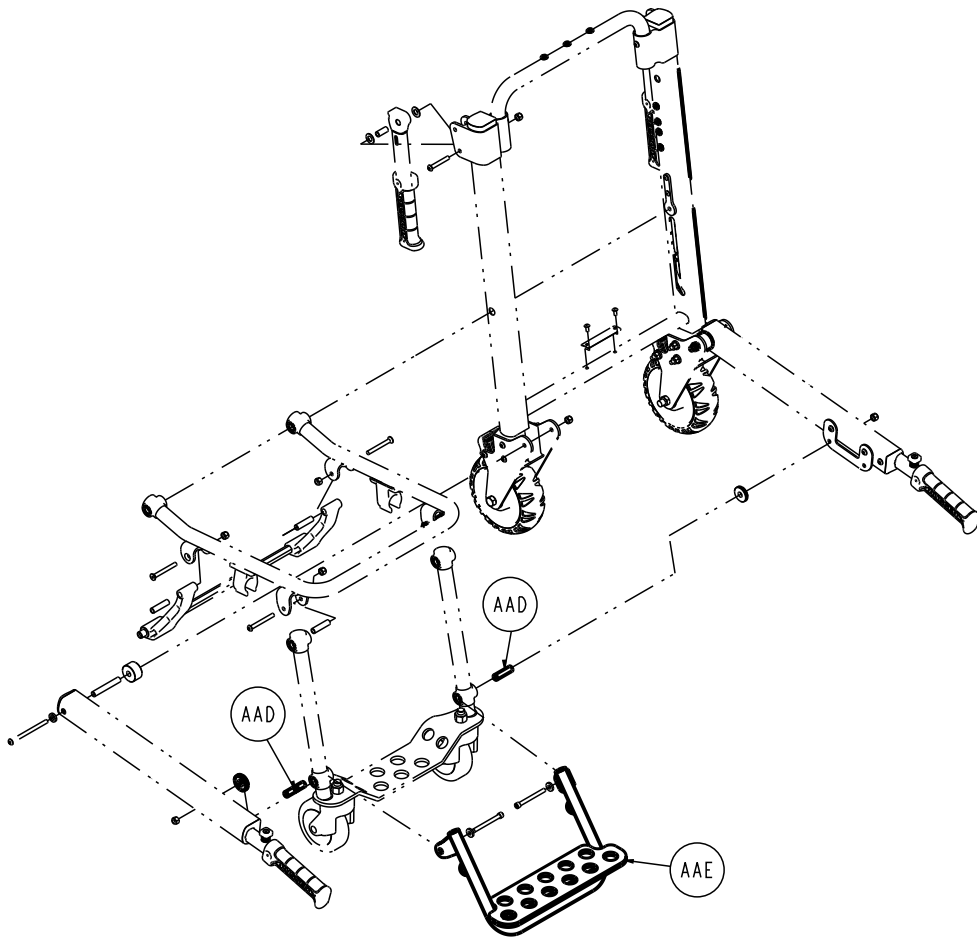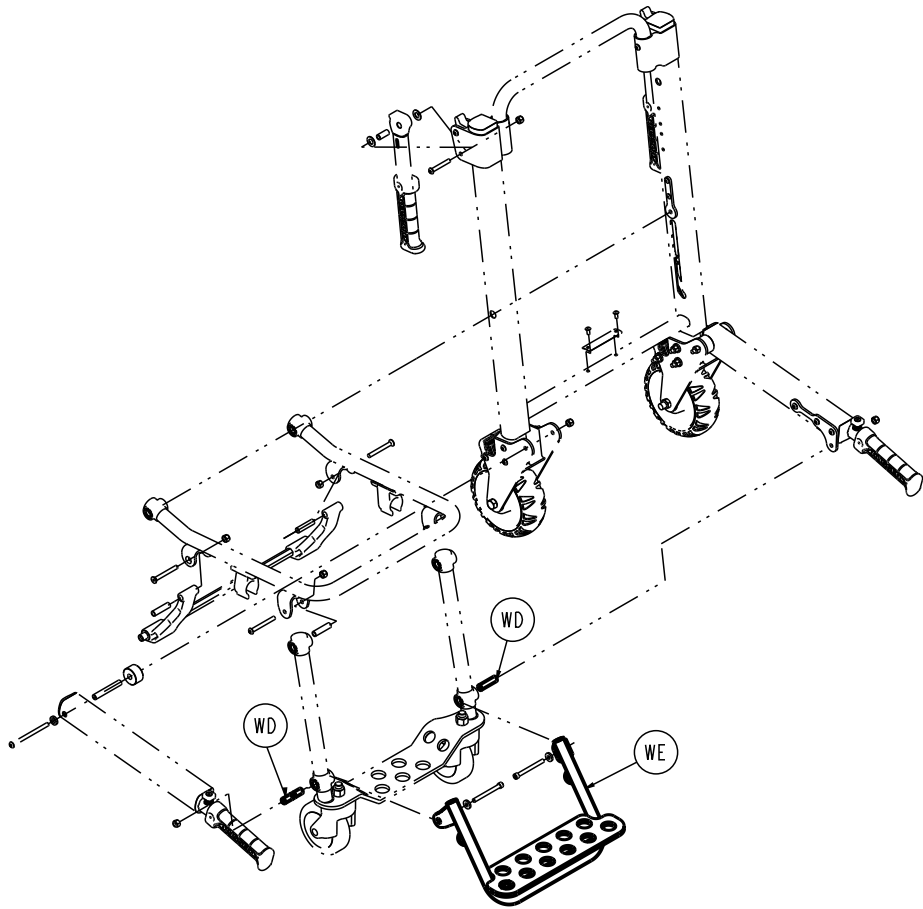

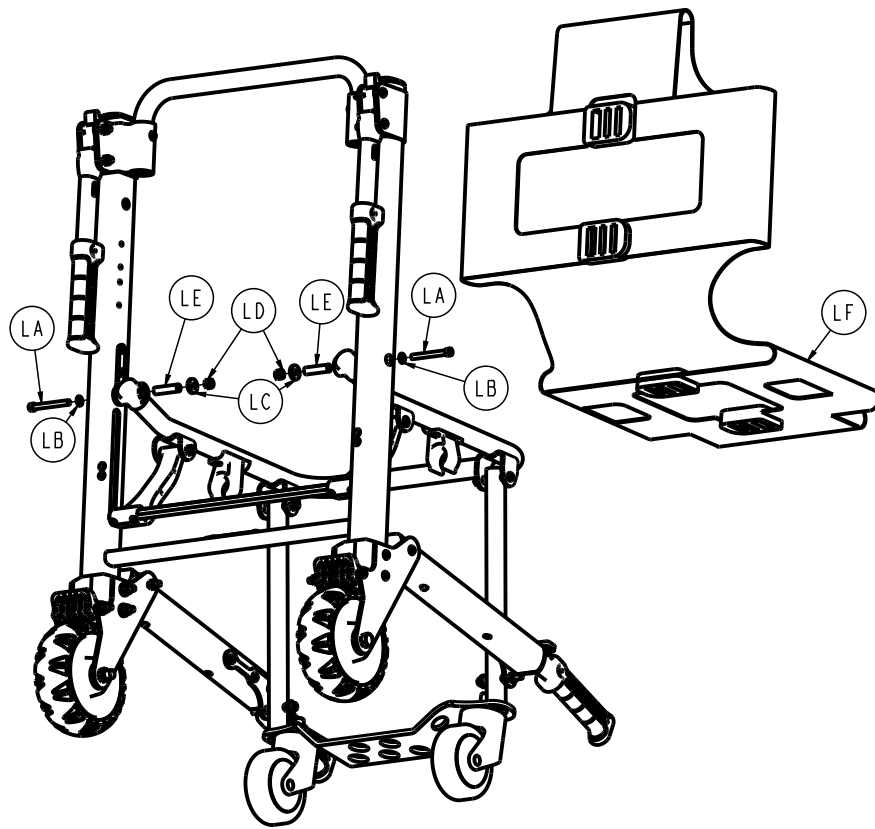



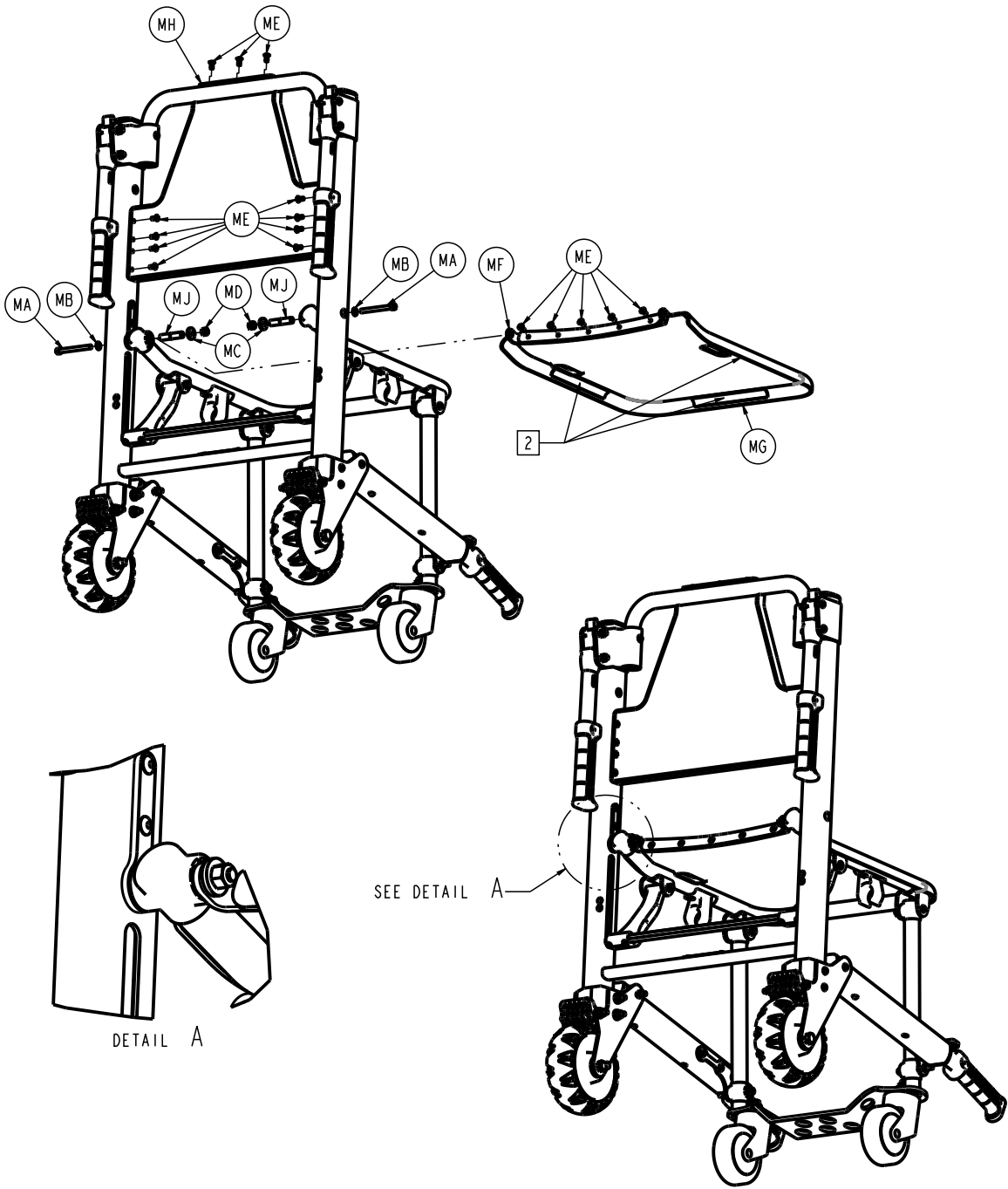

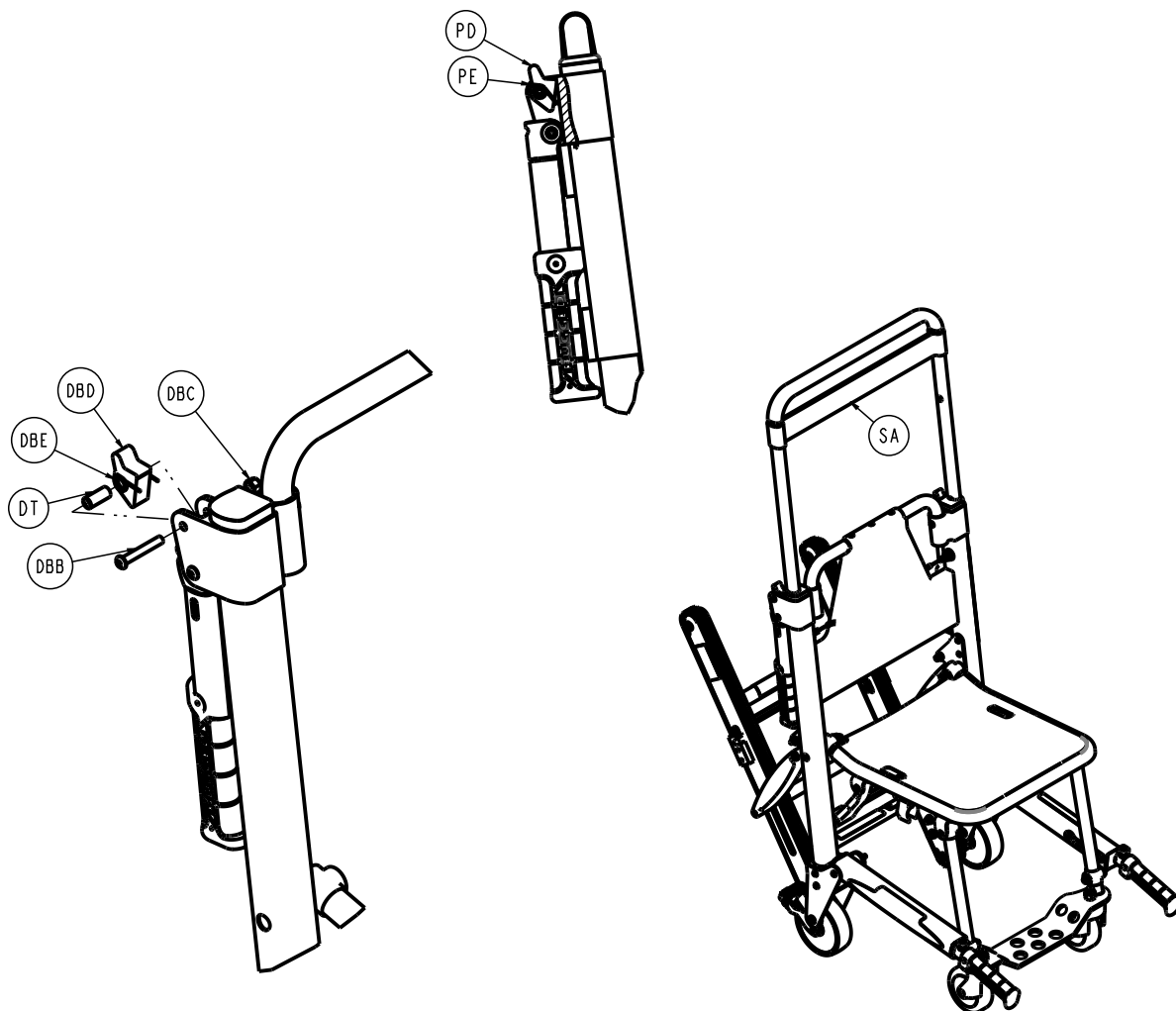

**Ensemble modèle 6251 6251-001-010 rév. C (référence uniquement)**

Élément	Numéro	Nom	Quantité
BA	6250-001-020	Composants communs	1
BB	6251-001-012	6251/6252 ensemble repose-pieds à roulette (page 41)	1
BC	6251-001-137	Étiquette, spécification 6251	1
BD	6251-001-926	Étiquette, étiquette avec numéro de série 6251	1

**Ensemble modèle 6252 6252-001-010 rév. D (référence uniquement)**

Élément	Numéro	Nom	Quantité
CA	6250-001-020	Composants communs	1
CB	6251-001-012	6251/6252 ensemble repose-pieds à roulette (page 41)	1
CC	6252-001-137	Étiquette, spéc. 6252	1
CD	6252-001-138	Étiquette, déblocage du guide	1
CE	6252-001-139	Étiquette, ne pas lubrifier	2
CF	6252-001-926	Étiquette, étiquette avec numéro de série 6252	1

**Ensemble de chaise modèle 6250 - composants communs - 6250-001-020 rév. L (référence uniquement)**

Élément	Numéro	Nom	Quantité
DA	0001-167-000	Vis à empreinte à tête plate	2
DB	0004-204-000	Vis d'assemblage à tête ronde	2
DC	0004-163-000	Vis d'assemblage à tête ronde	2
DD	0004-235-000	Vis d'assemblage à tête ronde	2
DG	0014-020-000	Rondelle	4
DH	0014-099-000	Rondelle	2
DJ	0016-028-000	Écrou hexagonal Nylock	10
DL	0025-172-000	Rivet aveugle	2
DN	6250-001-013	<i>Ensemble de section siège (page 49)</i>	1
DP	6250-001-016	<i>Ensemble de poignée relevable (page 50)</i>	2
DR	6250-001-017	<i>Ensemble de mécanisme de verrouillage (page 51)</i>	1
DS	6250-001-098	Entretoise pivotante	4
DT	6250-001-111	Entretoise pivotante de poignée relevable	4
DU	6250-001-140	Étiquette, <b>Stair-PRO</b>	2
DV	6082-090-042	Étiquette, 8 po <b>RUGGED</b>	2
DW	0011-209-000	Rondelle	2
DY	0011-159-000	Rondelle	2
DBA	0004-517-000	Vis d'assemblage à six pans creux	2
DBB	0004-204-000	Vis d'assemblage à tête ronde	2
DBC	0016-028-000	Écrou Nylock	2
DBD	6250-001-113	Gâchette, poignée relevable	2
DBE	6250-001-114	Ressort unique	2

**Ensemble de cadre principal modèle 6250 en option - 6250-022-000 rév. A (référence uniquement)**

Élément	Numéro	Nom	Quantité
EA	6250-001-011	<i>Ensemble de cadre principal 6251 (page 1 27)</i>	

**Ensemble cadre principal étendu en option - 6250-023-000 rév. A (référence uniquement)**

Élément	Numéro	Nom	Quantité
FA	6250-003-011	Ensemble de cadre principal, étendu	1

**Ensemble de cadre principal modèle 6252 en option - 6252-022-000 rév. A (référence uniquement)**

Élément	Numéro	Nom	Quantité
GA	6252-001-011	<i>Ensemble de cadre principal 6252 (page 1 29)</i>	

**Ensemble cadre principal étendu en option - 6252-023-000 rév. A (référence uniquement)**

Élément	Numéro	Nom	Quantité
HA	6252-003-011	Ensemble de cadre principal, étendu	1

**Sans clip pour poche IV en option - 6252-024-000 rév. A (référence uniquement)**


Élément	Numéro	Nom	Quantité
CAA	6252-001-012	Poignée d'extension supérieure	1

**Clip pour poche IV en option - 6252-025-000 rév. A (référence uniquement)**

<b>Élément</b>	<b>Numéro</b>	<b>Nom</b>	<b>Quantité</b>
DAA	6252-001-212	Poignée d'extension supérieure pour clip IV	1
DAB	6252-001-153	Sangle IV	1

# Ensemble de cadre principal 6251

6250-001-011 rév. F (référence uniquement)

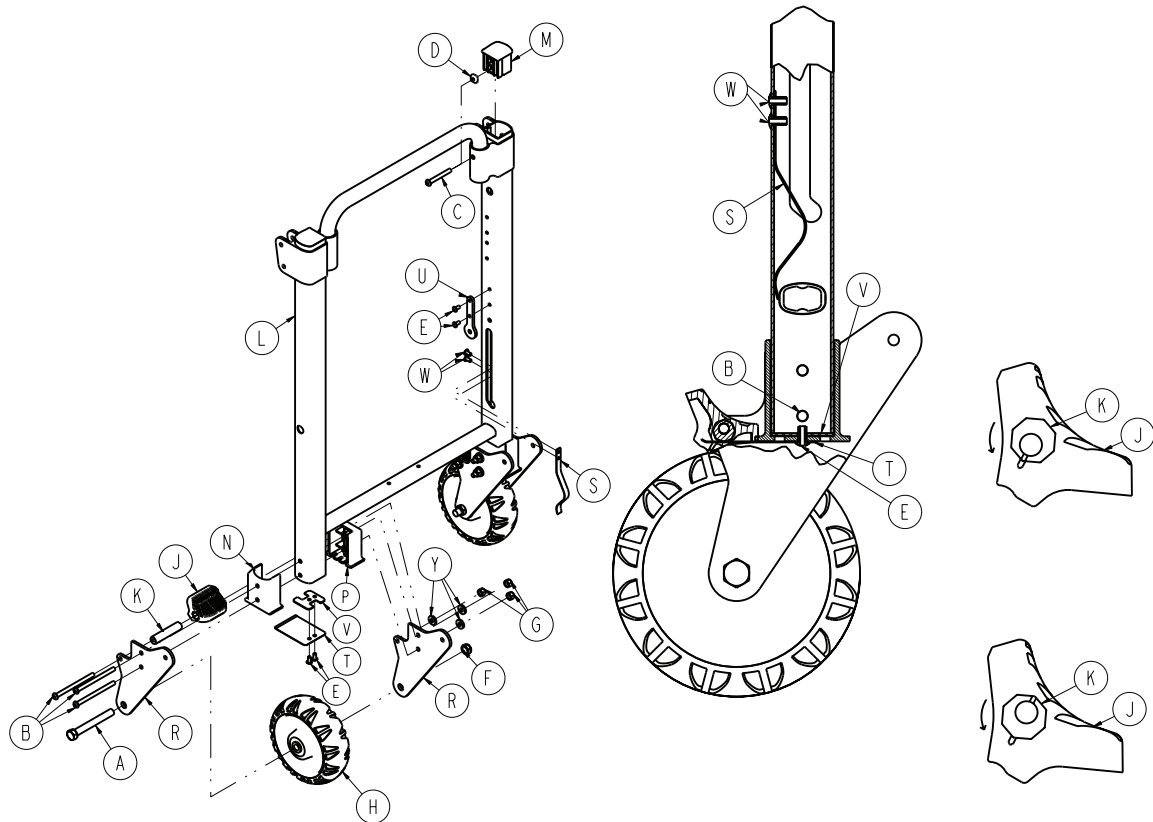



Élément	Numéro	Nom	Quantité
A	0003-033-000	Vis à tête hexagonale	2
B	0004-235-000	Vis d'assemblage à tête ronde	6
C	0004-511-000	Vis d'assemblage à tête ronde	2
D	0015-016-000	Écrou carré	2
E	0025-172-000	Rivet aveugle	8
F	0016-139-000	Écrou Nylock	2
G	0016-028-000	Écrou hexagonal Nylock	6
H	6060-002-010	Ensemble de roue moulée de 6 po (page 38)	2
J	6080-300-030	Pédale de blocage de roulette réglable	2
K	6080-200-041	Gaine hexagonale	2
L	6250-001-055	Ensemble soudé du châssis	1
M	6250-001-086	Capuchon d'extrémité d'extrusion externe	2
N	6250-001-102	Entretoise de support de roue externe	2
P	6250-001-103	Entretoise de support de roue interne	2
R	6250-001-104	Estampage du support de roue	4
S	6250-001-118	Ressort de retenue du mécanisme de verrouillage	2
T	6250-001-131	Ressort	2
U	6250-001-132	Entretoise d'estampage du siège	2
V	6250-001-134	Plaque dorsale à rivets	2

<b>Élément</b>	<b>Numéro</b>	<b>Nom</b>	<b>Quantité</b>
W	0025-079-000	Rivet aveugle	4
Y	0011-209-000	Rondelle	6

# Ensemble de cadre principal 6252

6252-001-011 rév. J (référence uniquement)

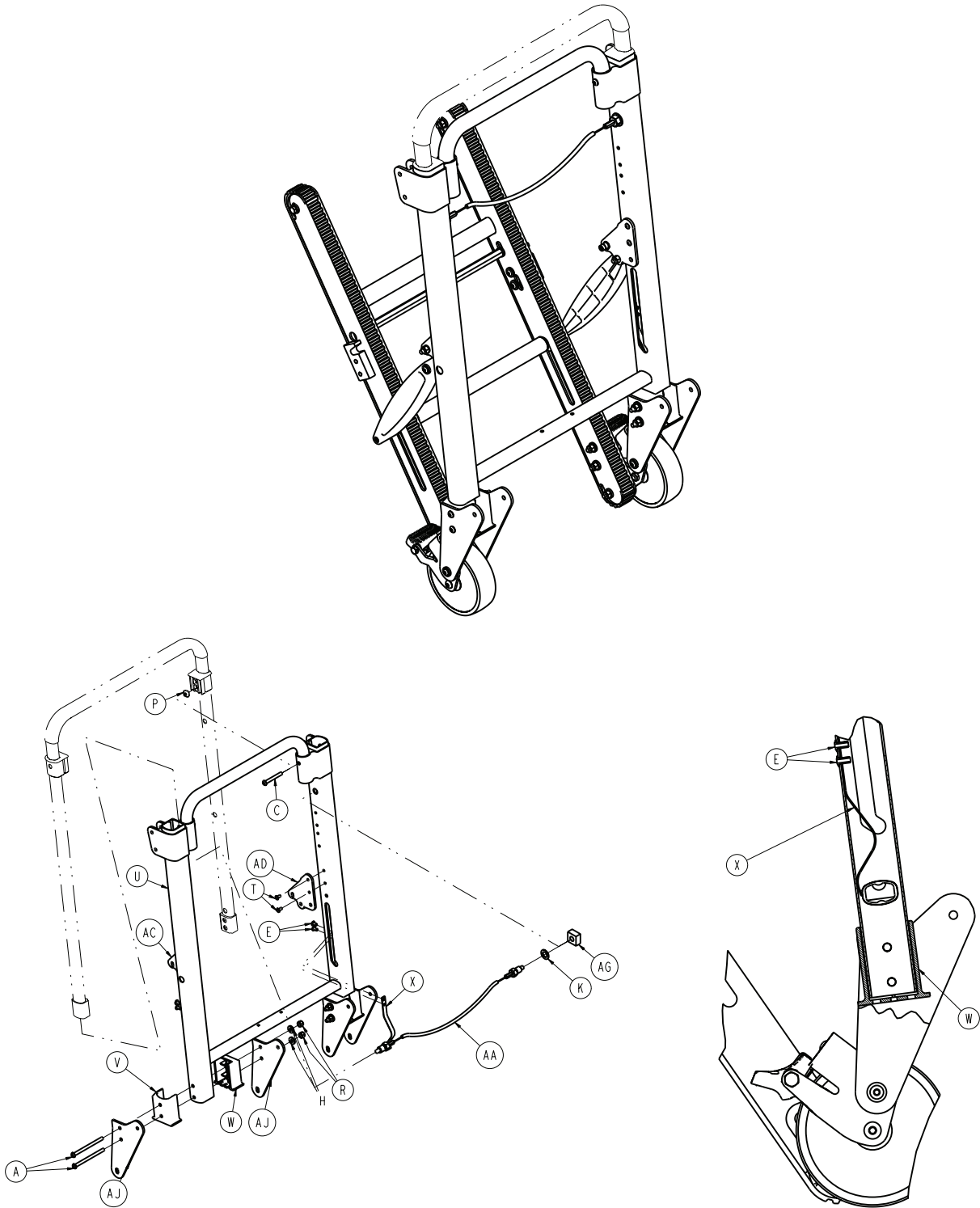

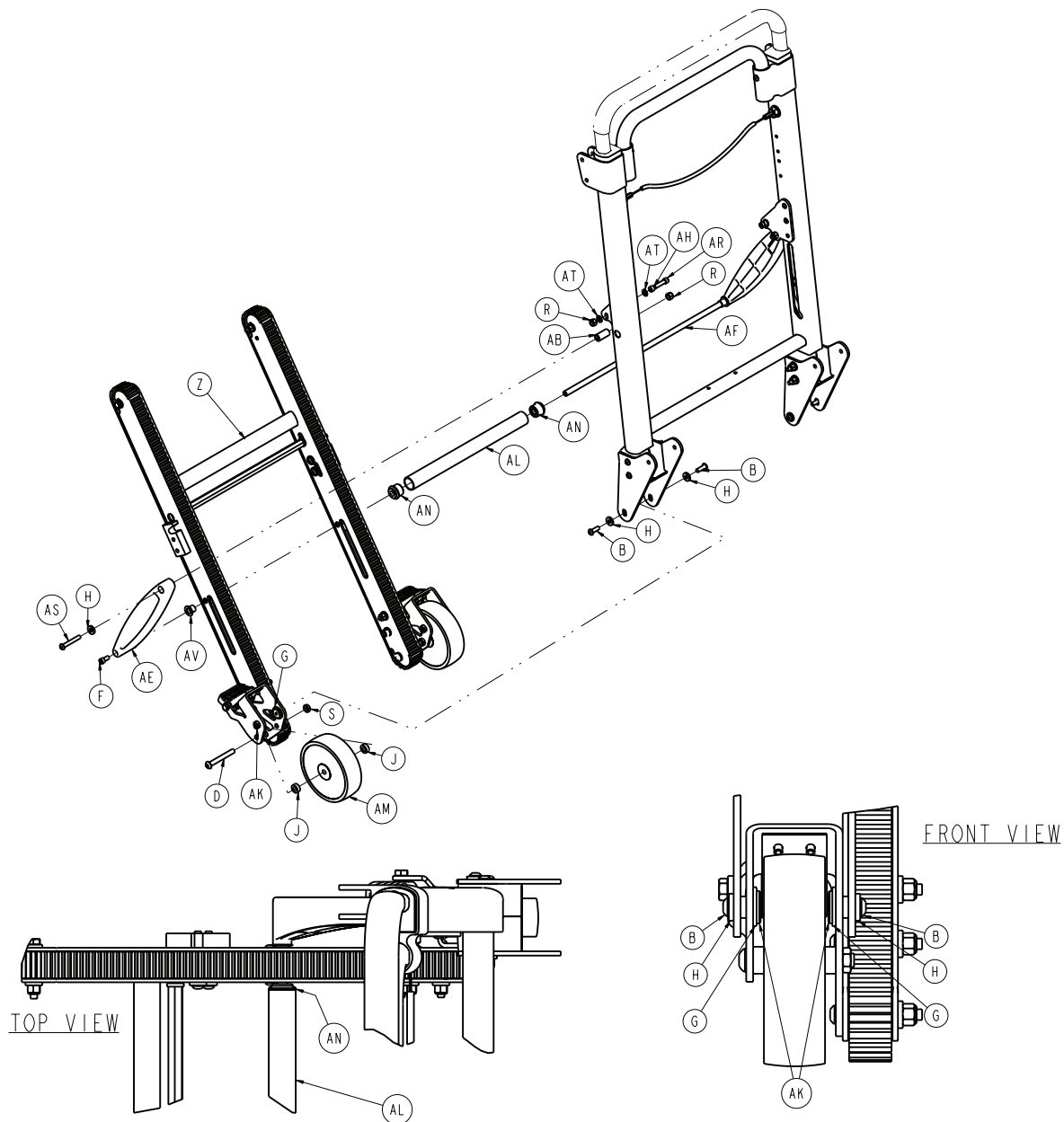


Élément	Numéro	Nom	Quantité
A	0004-235-000	Vis d'assemblage à tête ronde	4
B	0004-468-000	Vis d'assemblage à tête ronde	4
C	0004-511-000	Vis d'assemblage à tête ronde	2
D	0004-512-000	Vis d'assemblage à tête ronde	2
E	0025-079-000	Rivet aveugle	4
F	0004-514-000	Vis d'assemblage à six pans creux	2
G	0011-045-000	Rondelle	4
H	0011-209-000	Rondelle	10
J	0011-423-000	Entretoise	4
K	0011-455-000	Rondelle	2
P	0015-016-000	Écrou carré	2
R	0016-028-000	Écrou Nylock	8
S	0016-316-000	Contre-écrou hexagonal Centerlock	2



Élément	Numéro	Nom	Quantité
T	0025-172-000	Rivet aveugle	4
U	6250-001-055	Ensemble soudé du châssis	1
V	6250-001-102	Entretoise de support de roue, externe	2
W	6250-001-103	Entretoise de support de roue, interne	2
X	6250-001-118	Ressort de retenue du mécanisme de verrouillage	2
Z	6252-001-013	<i>Ensemble de cadre de guide, ceinture standard (page 33)</i>	1
AA	6252-001-016	<i>Ensemble de câble et broche (page 37)</i>	1
AB	6252-001-084	Entretoise des galets de la ceinture de guide	2
AC	6252-001-124	Support de déport du support de guide	1
AD	6252-001-125	Support de déport du support de guide	1
AE	6252-001-088	Entretoise de support de guide	2
AF	6252-001-089	Barre transversale du support de guide	1
AG	6252-001-094	Butée fixe de la poignée d'extension supérieure	2
AH	6252-001-096	Tenon de verrouillage de guide	2
AJ	6252-001-104	Support de roue	4
AK	6252-001-106	Pivot de l'entretoise de guide	4
AL	6252-001-113	Entretoise de tube de guide	1
AM	6252-001-114	Roue de 5 po	2
AN	6252-001-120	Écarteur de gaine du guide	2
AR	0004-028-000	Vis d'assemblage à six pans creux	2
AS	0004-204-000	Vis d'assemblage à tête ronde	2
AT	0011-064-000	Rondelle	4
AV	6250-001-124	Roulement de bride	2

# Poignée d'extension supérieure


6252-001-012 rév. B (référence uniquement)

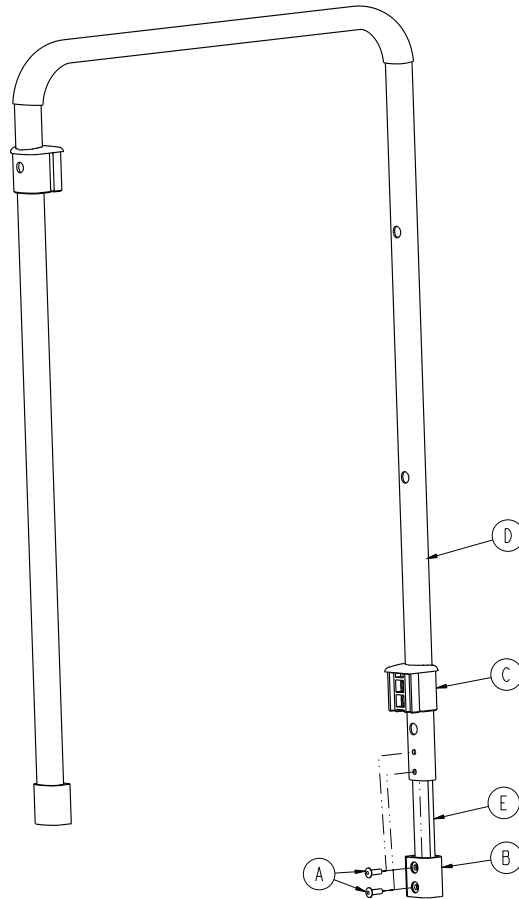

Élément	Numéro	Nom	Quantité
A	0025-133-000	Rivet aveugle	4
B	6250-001-085	Douille coulissante interne	2
C	6250-001-087	Douille pour poignée d'extension externe	2
D	6252-001-090	Poignée interne supérieure	1
E	6252-001-145	Renforceur de poignée	2

# Ensemble de cadre de guide, ceinture standard

6252-001-013 rév. E (référence uniquement)

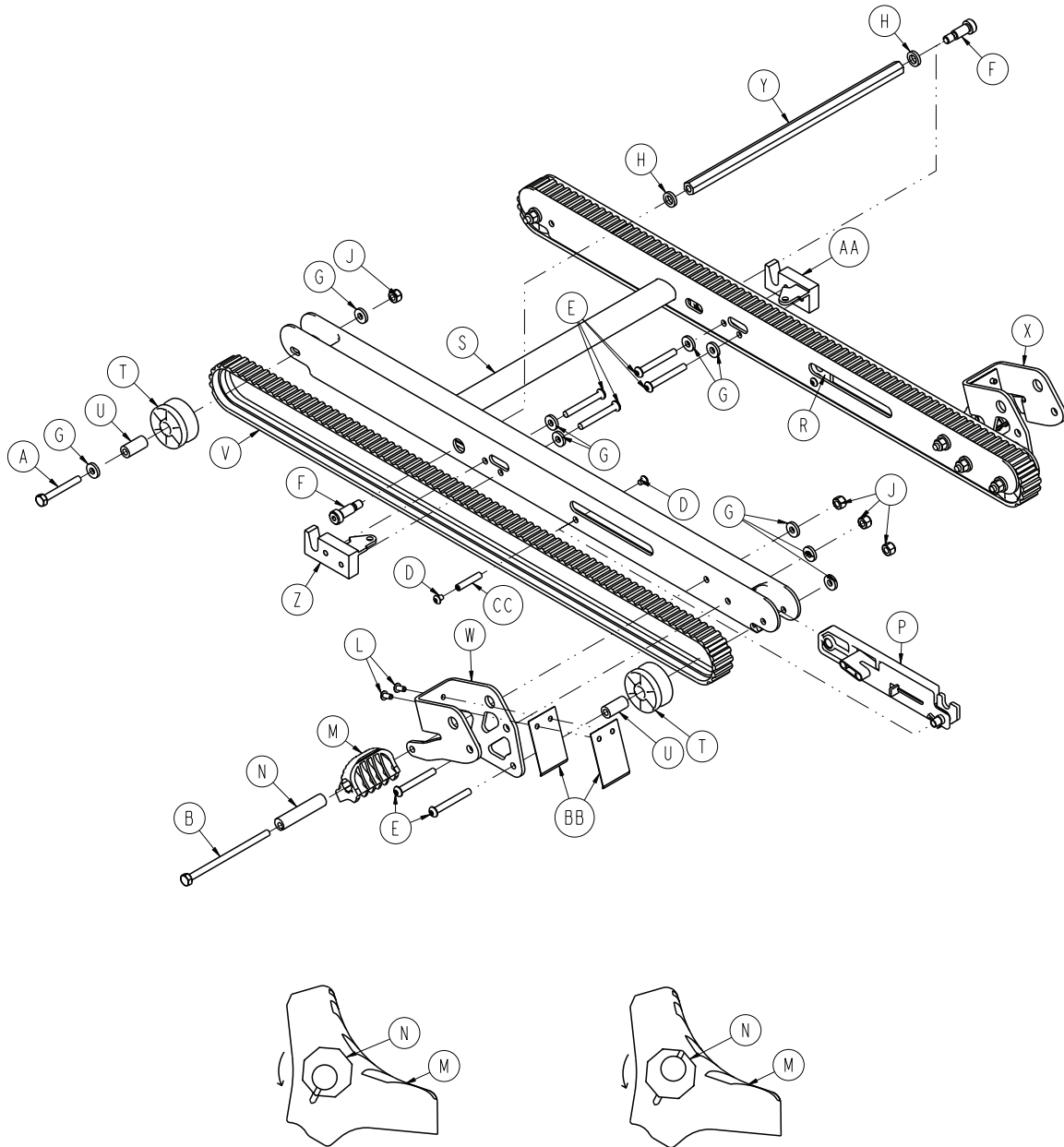


Élément	Numéro	Nom	Quantité
A	0003-358-000	Vis à tête hexagonale	2
B	0003-365-000	Vis à tête hexagonale	2
D	0004-483-000	Vis d'assemblage à tête ronde	4
E	0004-511-000	Vis d'assemblage à tête ronde	8
F	0008-063-000	Vis d'assemblage à six pans creux	2
G	0011-209-000	Rondelle	14
H	0014-099-000	Rondelle	2
J	0016-028-000	Écrou hexagonal	8
L	0025-172-000	Rivet aveugle	4
M	6080-300-030	Pédale de blocage de roulette réglable	2
N	6080-200-041	Gaine hexagonale	2

Élément	Numéro	Nom	Quantité
P	6252-001-014	<i>Mécanisme de verrouillage interne - 6252-001-014 (page 35)</i>	1
R	6252-001-015	<i>Mécanisme de verrouillage interne - 6252-001-015 (page 36)</i>	1
S	6252-001-050	Ensemble soudé du châssis du guide	1
T	6252-001-083	Roulette de la ceinture de guide	4
U	6252-001-084	Entretoise des galets de la ceinture de guide	4
V	6252-001-085	Ceinture de guide	2
W	6252-001-102	Estampage du support de roue	1
X	6252-001-103	Estampage du support de roue	1
Y	6252-001-105	Barre transversale du mécanisme de verrouillage	1
Z	6252-001-110	Loquet	1
AA	6252-001-111	Loquet	1
BB	6252-001-112	Ressort	4
CC	6252-001-121	Verrouillage de l'entretoise interne du pivot	2

# Mécanisme de verrouillage interne - 6252-001-014


Rév. B (référence uniquement)

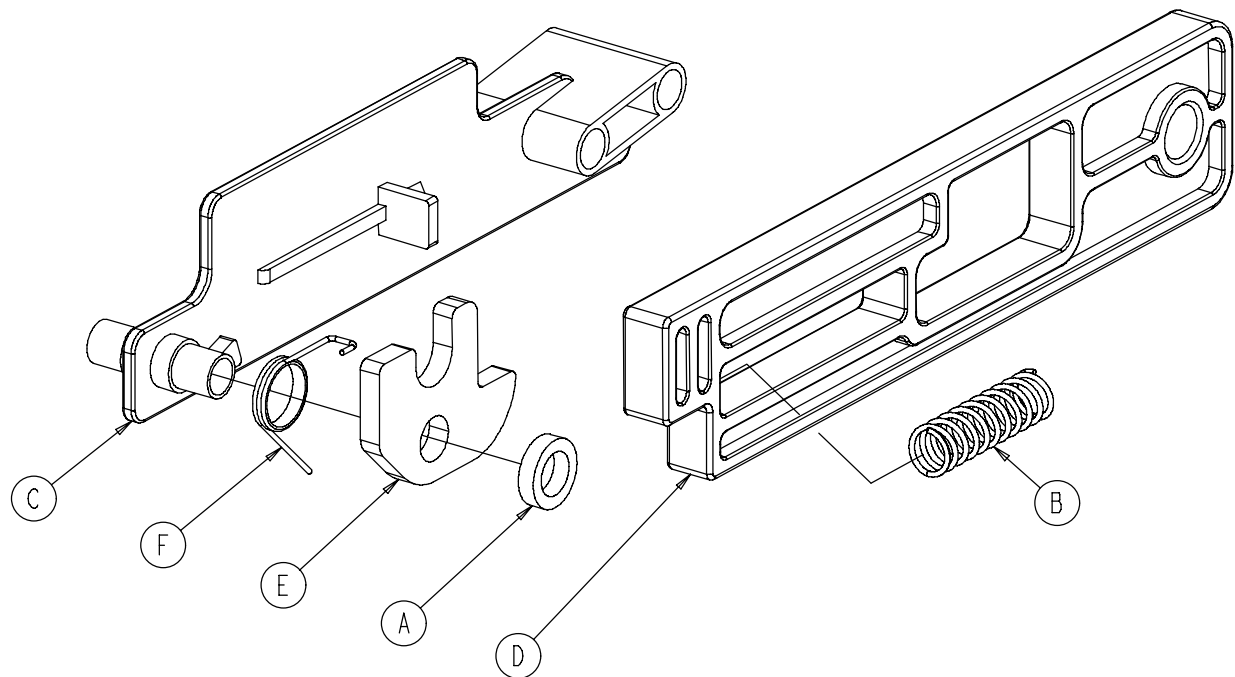

Élément	Numéro	Nom	Quantité
A	0014-098-000	Rondelle	1
B	0038-506-000	Ressort de compression	1
C	6252-001-097	Bloc de retenue du loquet	1
D	6252-001-098	Lame de déverrouillage du loquet	1
E	6252-001-099	Verrouillage du loquet du guide	1
F	6252-001-101	Ressort unique	1

# Mécanisme de verrouillage interne - 6252-001-015


Rév. B (référence uniquement)

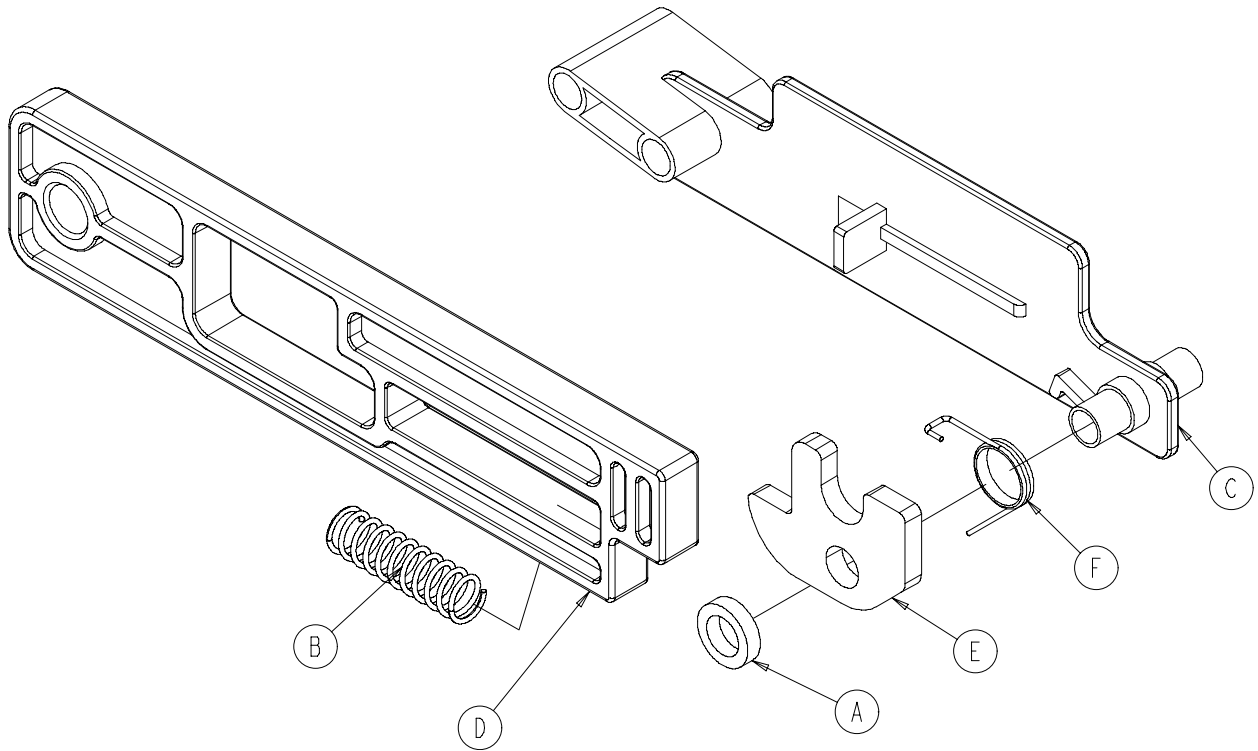

Élément	Numéro	Nom	Quantité
A	0014-098-000	Rondelle	1
B	0038-506-000	Ressort de compression	1
C	6252-001-097	Bloc de retenue du loquet	1
D	6252-001-098	Lame de déverrouillage du loquet	1
E	6252-001-099	Verrouillage du loquet du guide	1
F	6252-001-100	Ressort unique	1

# Ensemble de câble et broche


6252-001-016 rév. B (référence uniquement)

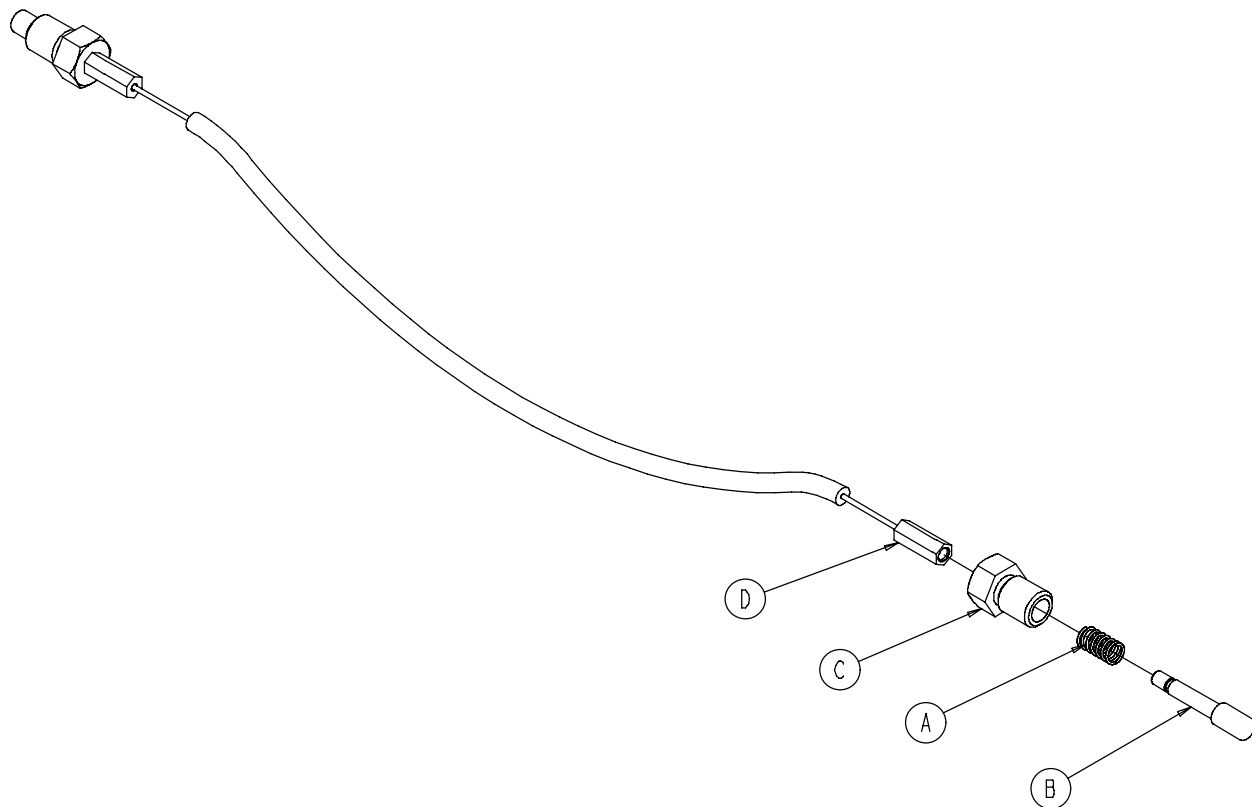

Élément	Numéro	Nom	Quantité
A	0038-507-000	Ressort de compression	2
B	6252-001-115	Broche de traction	2
C	6252-001-116	Boulon de la broche de traction	2
D	6252-001-119	Câble	1

# Ensemble de roue moulée de 6 po

6060-002-010 rév. D (référence uniquement)

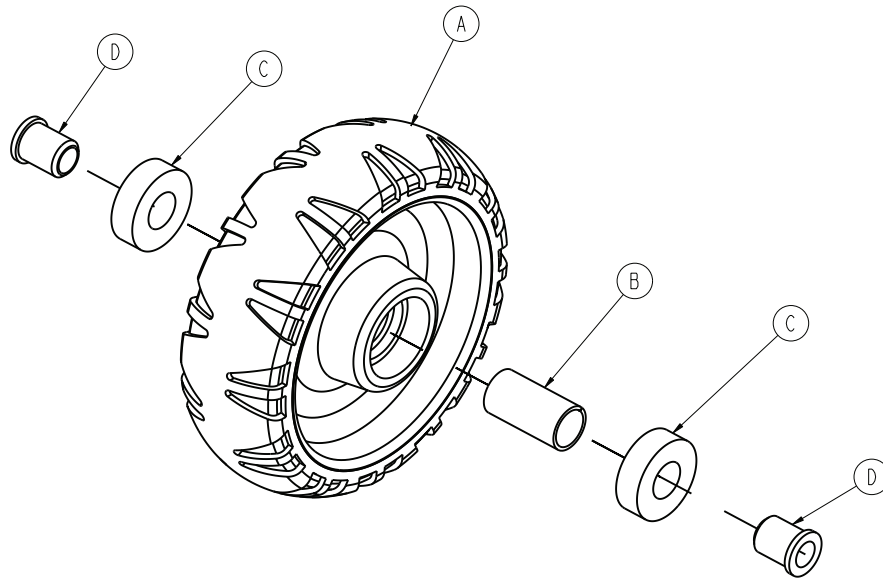


Élément	Numéro	Nom	Quantité
A	6060-002-045	Roue moulée de 6 po	1
B	6060-002-046	Entretoise de roulement	1
C	0081-226-000	Roulement	2
D	0715-001-255	Douille de roue	2



# Poignée relevable verrouillable en option - 6250-031-000


Rév. E/6250-001-005 rév. AA (référence uniquement)

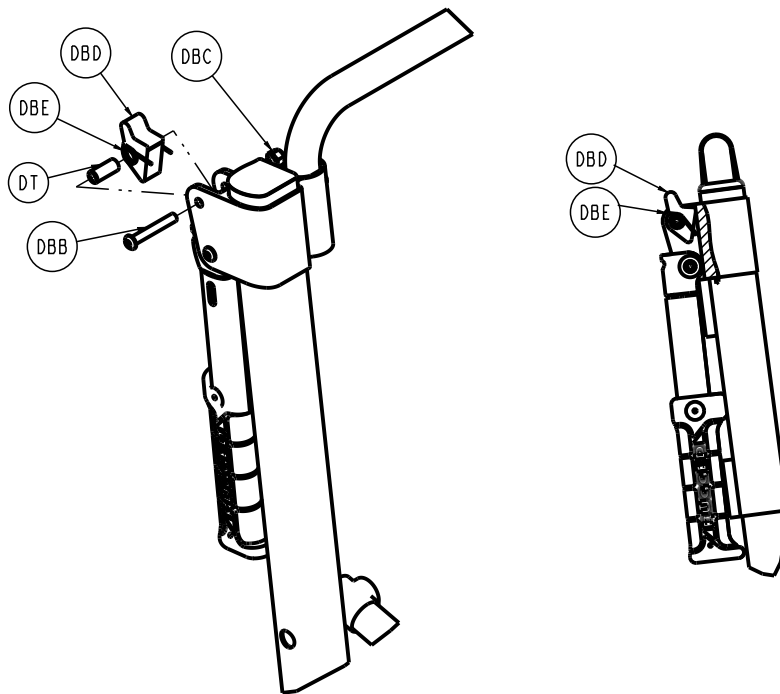

Élément	Numéro	Nom	Quantité
DT	6250-001-111	Entretoise pivotante de poignée relevable	2
DBB	0004-204-000	Vis d'assemblage à tête ronde	2
DBC	0016-028-000	Écrou Nylock	2
DBD	6250-001-113	Gâchette de la poignée relevable	2
DBE	6250-001-114	Ressort unique	2

# Ensemble de tube pour pied


6250-001-012 rév. A (référence uniquement)

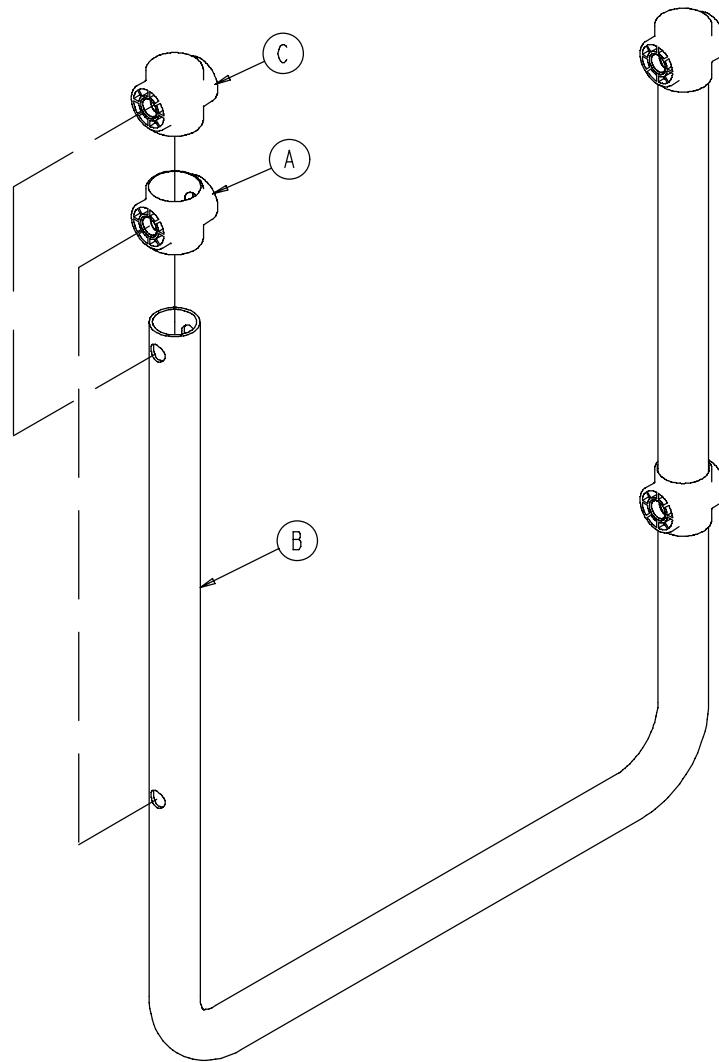

Élément	Numéro	Nom	Quantité
A	6250-001-090	Capuchon d'extrémité de la section pieds	2
B	6250-001-091	Tube de la section pieds	1
C	6250-001-096	Capuchon d'extrémité de la section pieds/siège	2

# 6251/6252 ensemble repose-pieds à roulette


6251-001-012 rév. AA (référence uniquement)

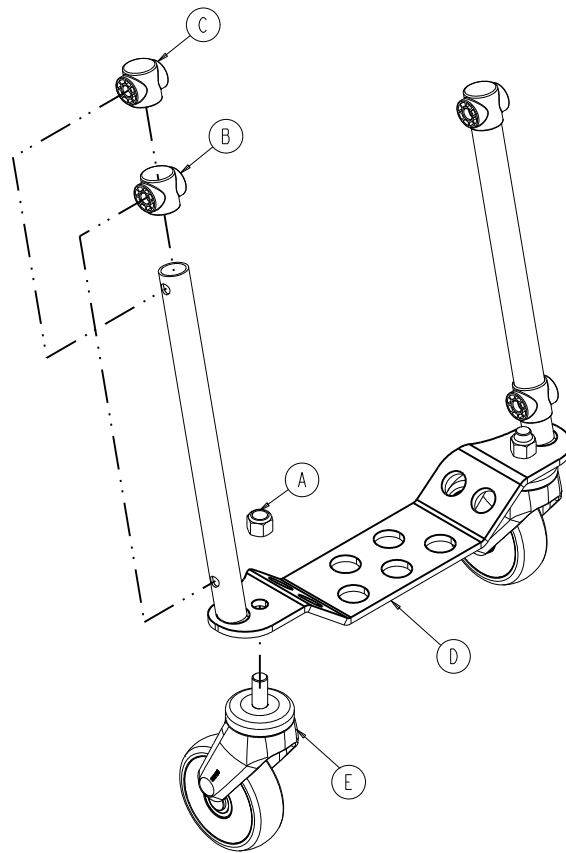

Élément	Numéro	Nom	Quantité
A	0016-064-000	Écrou hexagonal Nylock	2
B	6250-001-090	Capuchon d'extrémité de la section pieds	2
C	6250-001-096	Capuchon d'extrémité de la section pieds/siège	2
D	6251-001-050	Ensemble soudé de la section pieds	1
E	625100010083	Roulette	2

# 6251/6252 poignée de levage inférieure/sans repose-pieds en option - 6250-024-000/6252-028-000

Rév. C/Rév. C

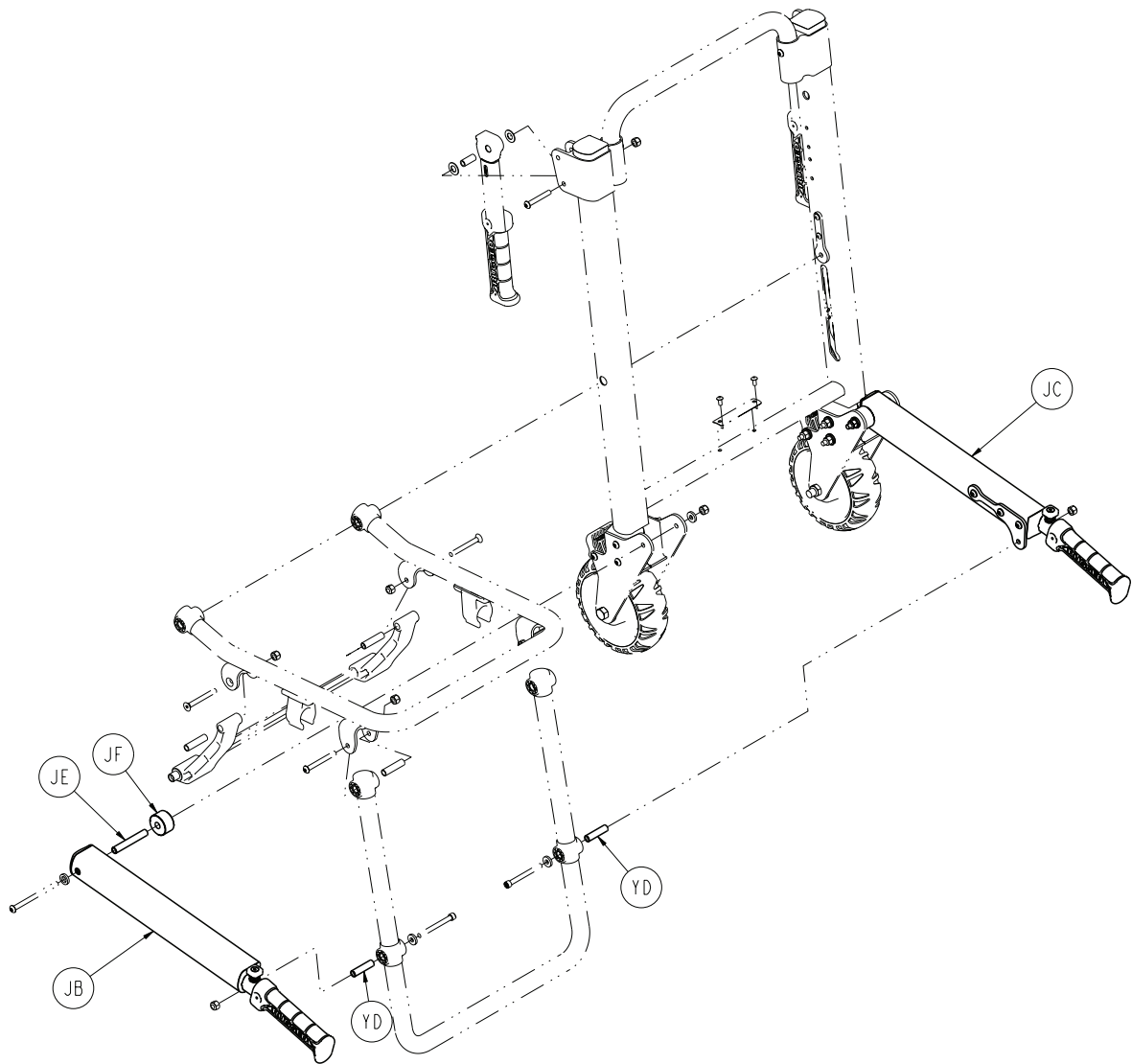


Élément	Numéro	Nom	Quantité
JB	6250-001-014	Poignée d'extension, droite	1
JC	6250-001-015	Poignée d'extension, gauche	1
JE	6250-001-129	Entretoise pivotante	2
JF	6250-001-133	Entretoise	2

Élément	Numéro	Nom	Quantité
YD	6250-001-098	Entretoise pivotante	2

# 6251/6252 poignée de levage inférieure en option - 6250-025-000


Rév. C (référence uniquement)

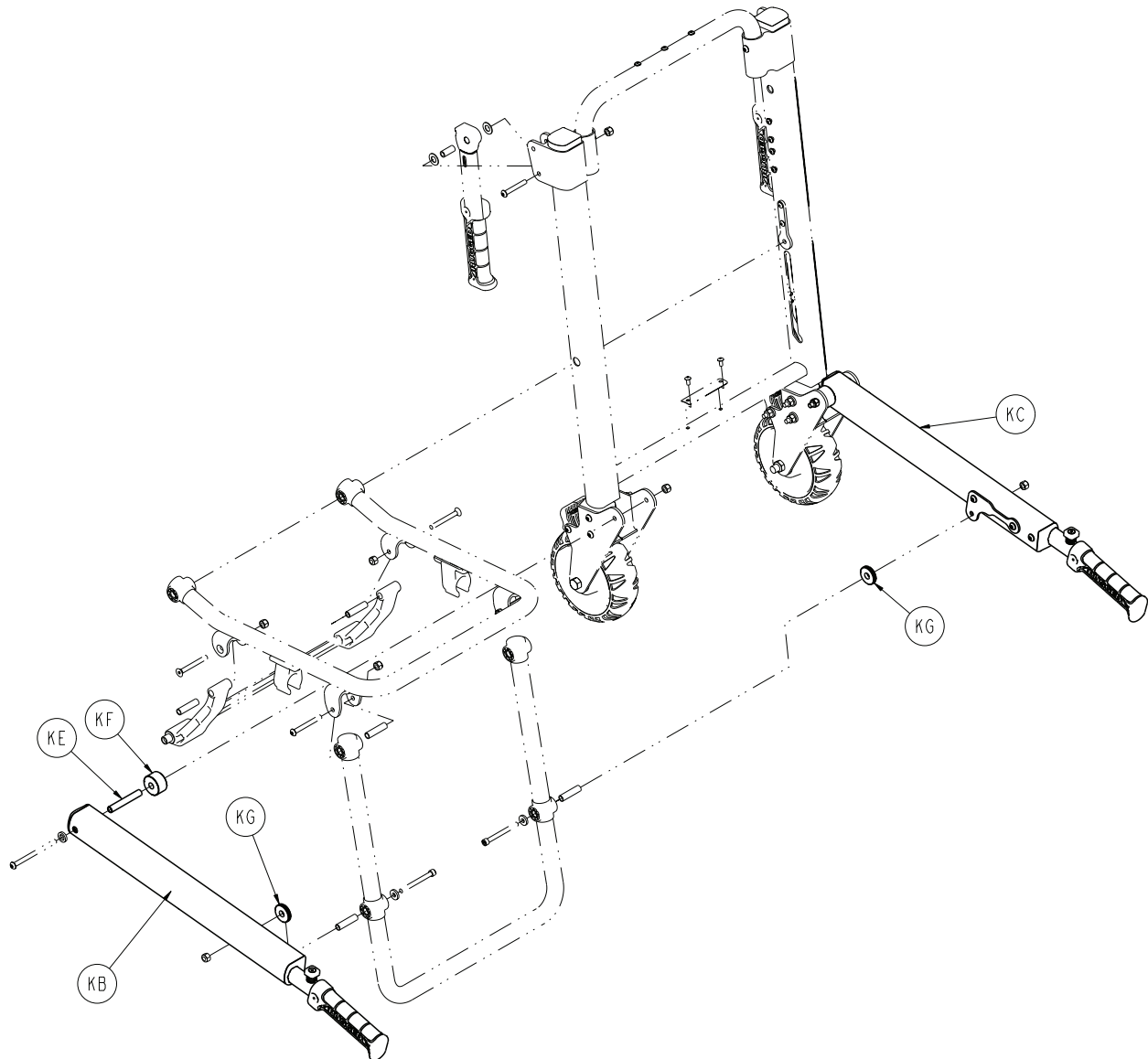

Élément	Numéro	Nom	Quantité
KB	6250-003-014	Poignée d'extension, droite	1
KC	6250-003-015	Poignée d'extension, gauche	1
KE	6250-003-129	Entretoise pivotante	2
KF	6250-003-133	Entretoise, localisateur de poignée d'extension	2
KG	6250-003-134	Entretoise, localisateur de poignée d'extension	2

# Ensemble de poignée d'extension, droite


6250-001-014 rév. E (référence uniquement)

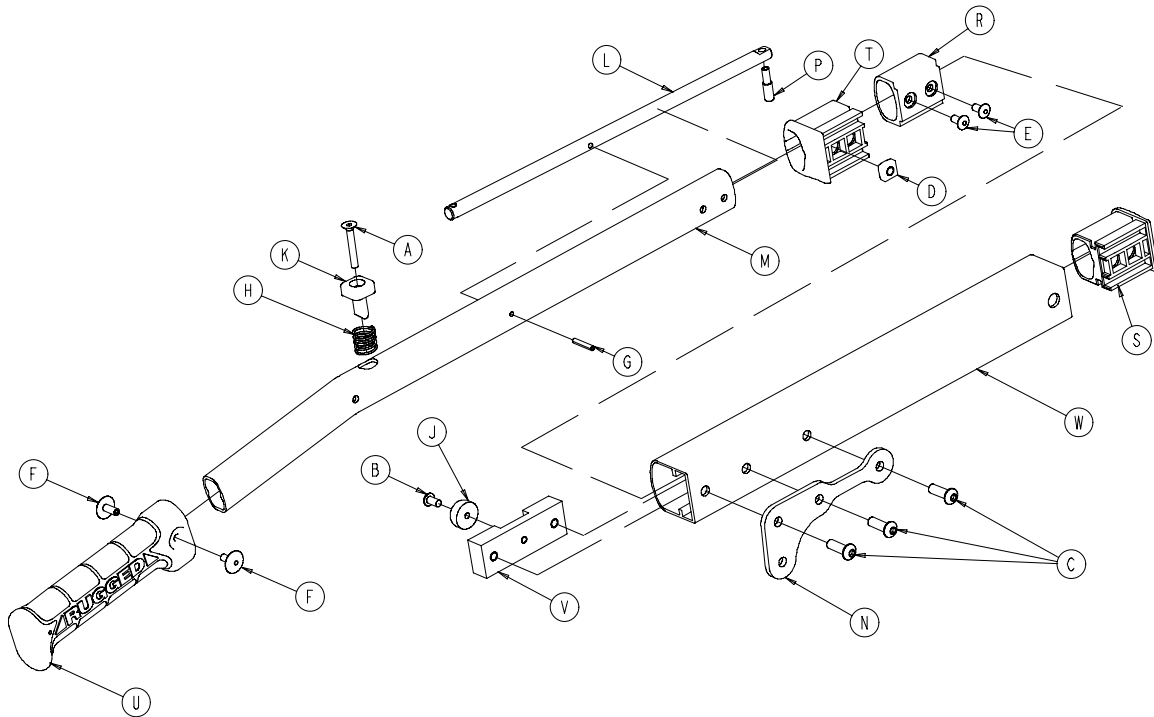

Élément	Numéro	Nom	Quantité
A	0001-138-000	Vis à empreinte à tête plate	1
B	0004-136-000	Vis d'assemblage à tête ronde	1
C	0004-509-000	Vis d'assemblage à tête ronde	3
D	0015-016-000	Écrou carré	1
E	0025-079-000	Rivet aveugle	2
F	0025-132-000	Rivet aveugle	2
G	0026-323-000	Broche à ressort spiralée	1
H	0038-462-000	Ressort de compression	1
J	0056-022-000	Pare-chocs	1
K	6100-031-065	Bouton-poussoir	1
L	6250-001-080	Levier de blocage du pivot	1
M	6250-001-081	Poignée d'extension interne	1
N	6250-001-082	Support pivotant	1
P	6250-001-083	Broche de verrouillage	1
R	6250-001-085	Douille coulissante interne	1
S	6250-001-086	Capuchon d'extrémité externe	1
T	6250-001-087	Douille externe	1
U	6250-001-089	Poignée	1
V	6250-001-112	Butée fixe	1
W	6250-001-121	Poignée externe d'extension, droite	1

# Ensemble de poignée d'extension, gauche


6250-001-015 rév. E (référence uniquement)

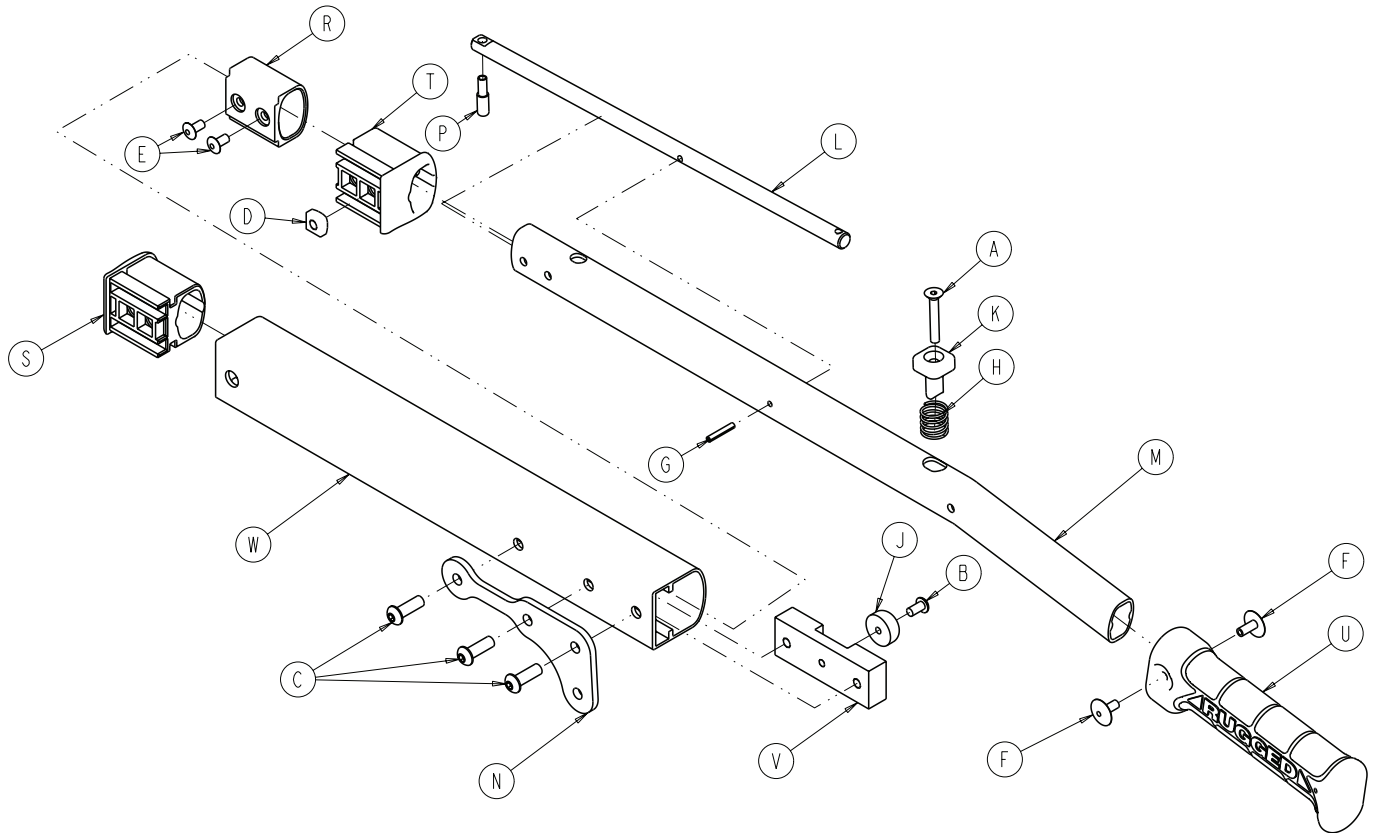

Élément	Numéro	Nom	Quantité
A	0001-138-000	Vis à empreinte à tête plate	1
B	0004-136-000	Vis d'assemblage à tête ronde	1
C	0004-509-000	Vis d'assemblage à tête ronde	3
D	0015-016-000	Écrou carré	1
E	0025-079-000	Rivet aveugle	2
F	0025-132-000	Rivet aveugle	2
G	0026-323-000	Broche à ressort spiralée	1
H	0038-462-000	Ressort de compression	1
J	0056-022-000	Pare-chocs	1
K	6100-031-065	Bouton-poussoir	1
L	6250-001-080	Levier de blocage du pivot	1
M	6250-001-081	Poignée d'extension interne	1
N	6250-001-082	Support pivotant	1
P	6250-001-083	Broche de verrouillage	1
R	6250-001-085	Douille coulissante interne	1
S	6250-001-086	Capuchon d'extrémité externe	1
T	6250-001-087	Douille externe	1
U	6250-001-089	Poignée	1
V	6250-001-112	Butée fixe	1
W	6250-001-122	Poignée externe d'extension, gauche	1

# 6251/6252 repose-pieds en option - 6252-027-000

Rév. B (référence uniquement)

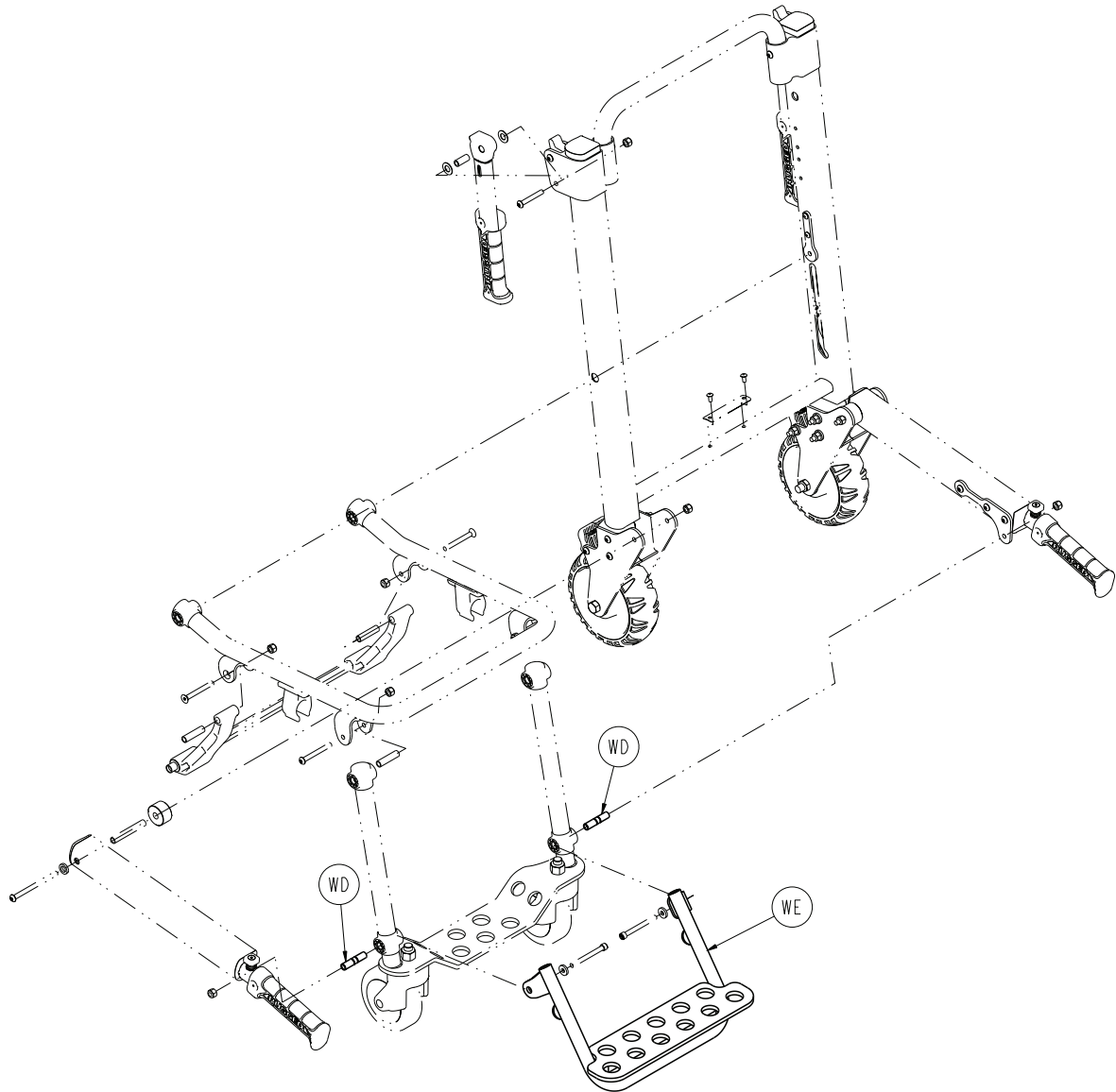


Élément	Numéro	Nom	Quantité
WD	6250-003-098	Entretoise pivotante	2
WE	6252-001-017	Ensemble de repose-pied	1



# 6252 poignée étendue/sans repose-pieds en option - 6252-030-000


Rév. C/6250-001-005 rév. AA (référence uniquement)

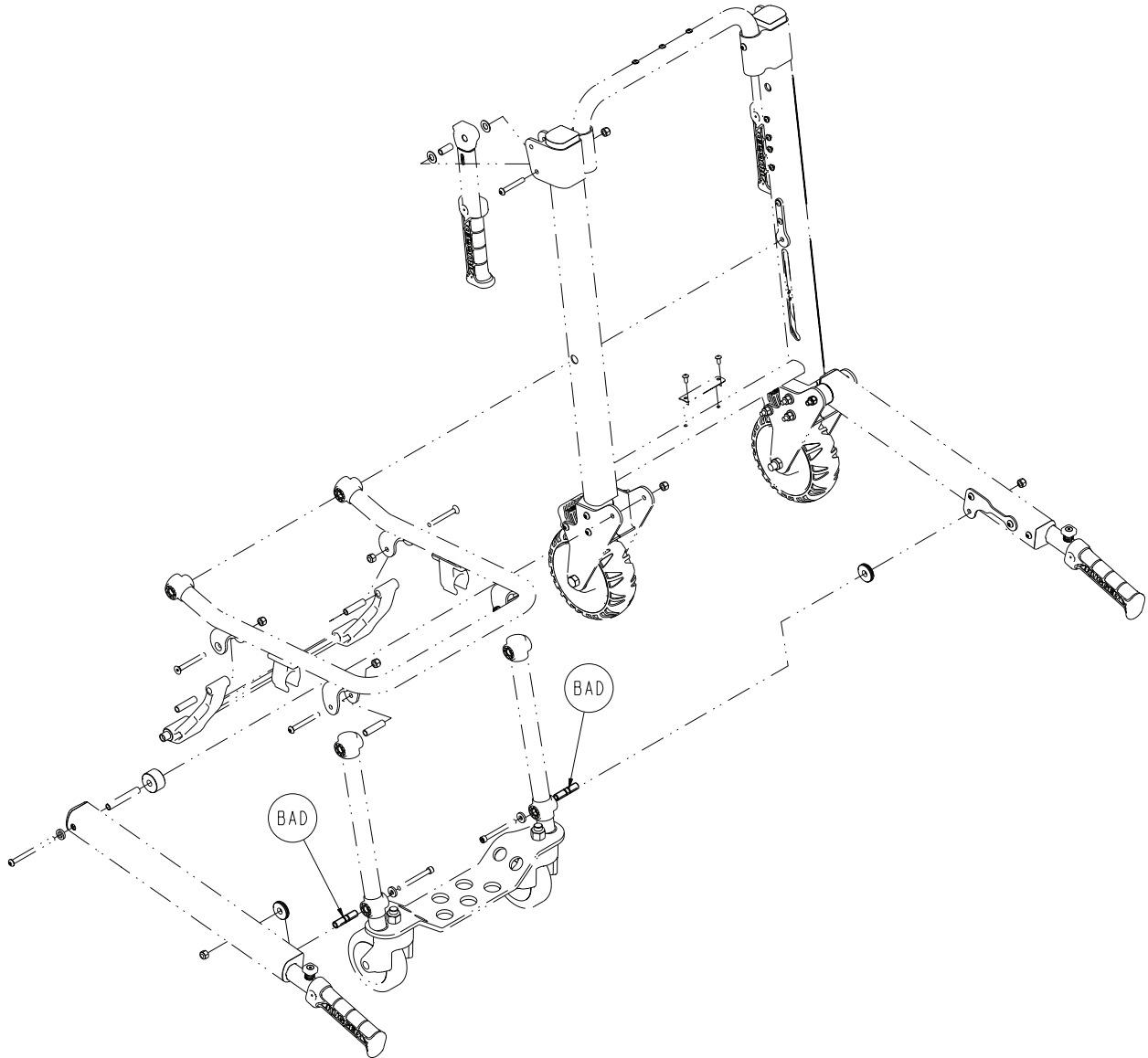

Élément	Numéro	Nom	Quantité
BAD	6250-003-098	Entretoise pivotante	2

# 6252 poignée étendue/repose-pieds en option - 6252-029-000


Rév. B/6250-001-005 rév. AA (référence uniquement)

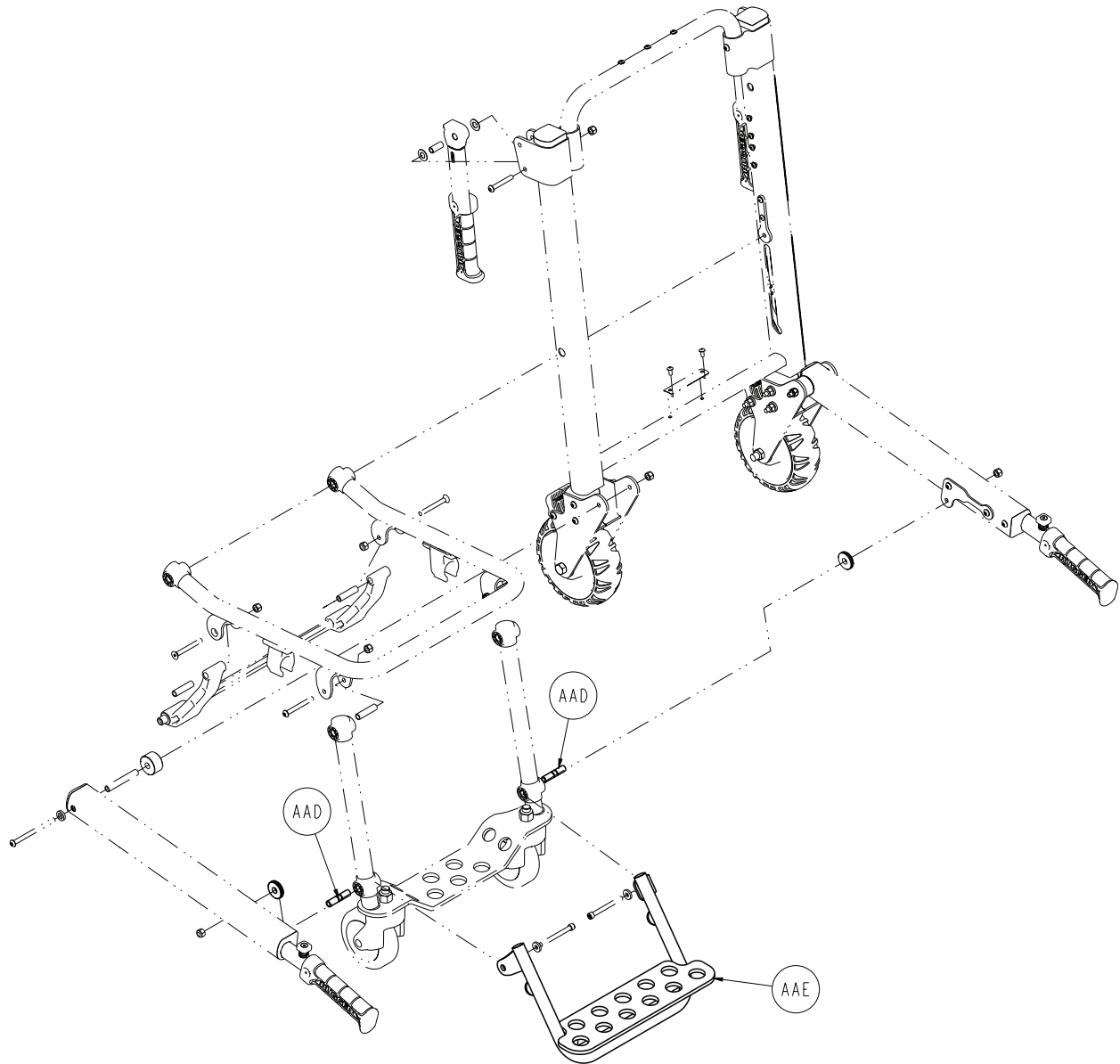

Élément	Numéro	Nom	Quantité
AAD	6250-009-099	Entretoise pivotante	2
AAE	6252-007-017	Ensemble de repose-pied	1

# Ensemble de section siège


6250-001-013 Rév. B (référence uniquement)

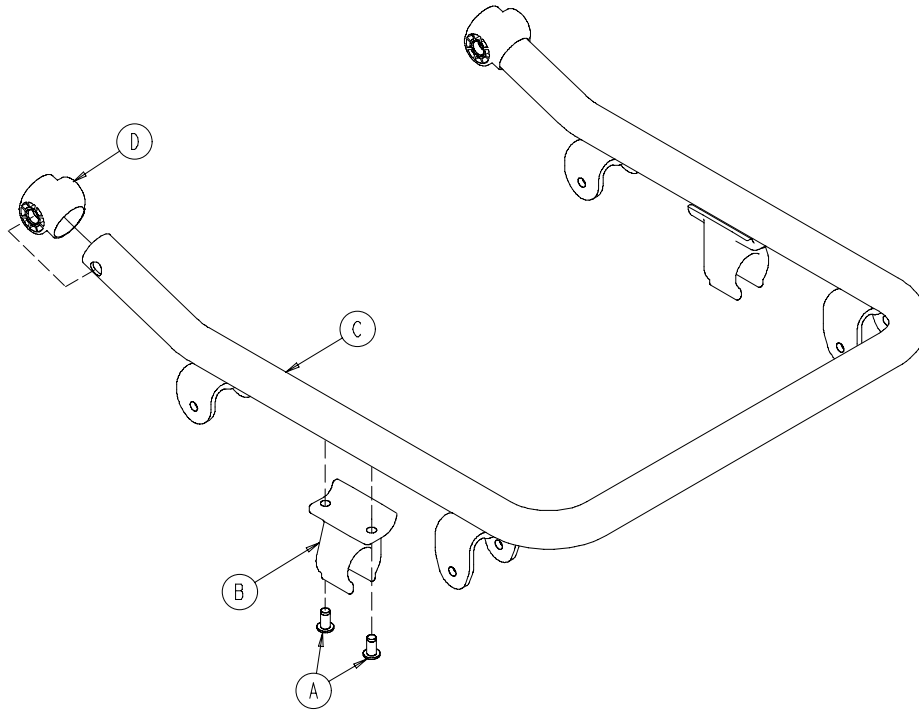

Élément	Numéro	Nom	Quantité
A	0025-120-000	Rivet	4
B	6250-001-165	Clip	2
C	6250-001-050	Ensemble soudé du châssis du siège	1
D	6250-001-096	Capuchon d'extrémité de la section pieds/siège	2

# Ensemble de poignée relevable


6250-001-016 rév. A (référence uniquement)

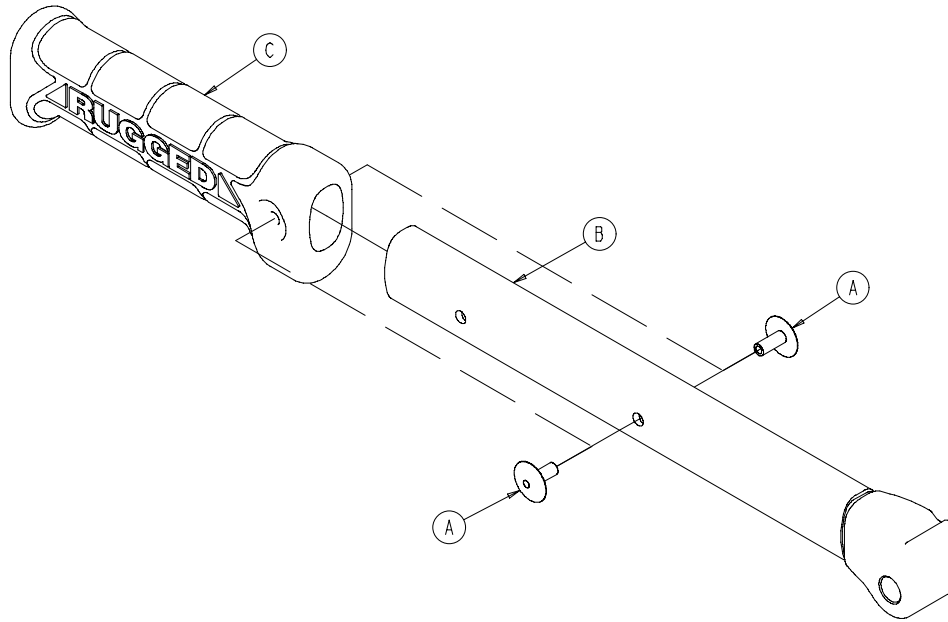

Élément	Numéro	Nom	Quantité
A	0025-132-000	Rivet aveugle	2
B	6250-001-052	Ensemble soudé de la poignée relevable	1
C	6250-001-089	Poignée	1

# Ensemble de mécanisme de verrouillage


6250-001-017 Rév. B (référence uniquement)

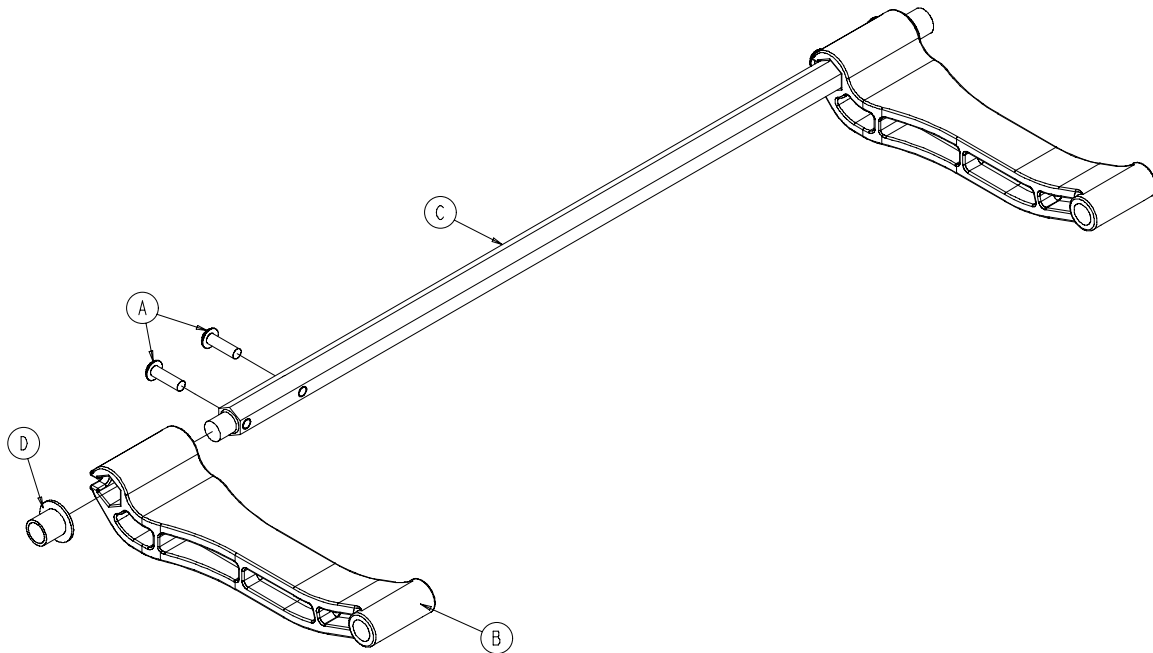

Élément	Numéro	Nom	Quantité
A	0004-515-000	Vis d'assemblage à tête ronde	4
B	6250-001-094	Mécanisme de verrouillage jambe de force	2
C	6250-001-095	Barre transversale	1
D	6250-001-124	Roulement de bride	2

# 6251/6252 option siège en vinyle - 6250-020-000


Rév. E (référence uniquement)

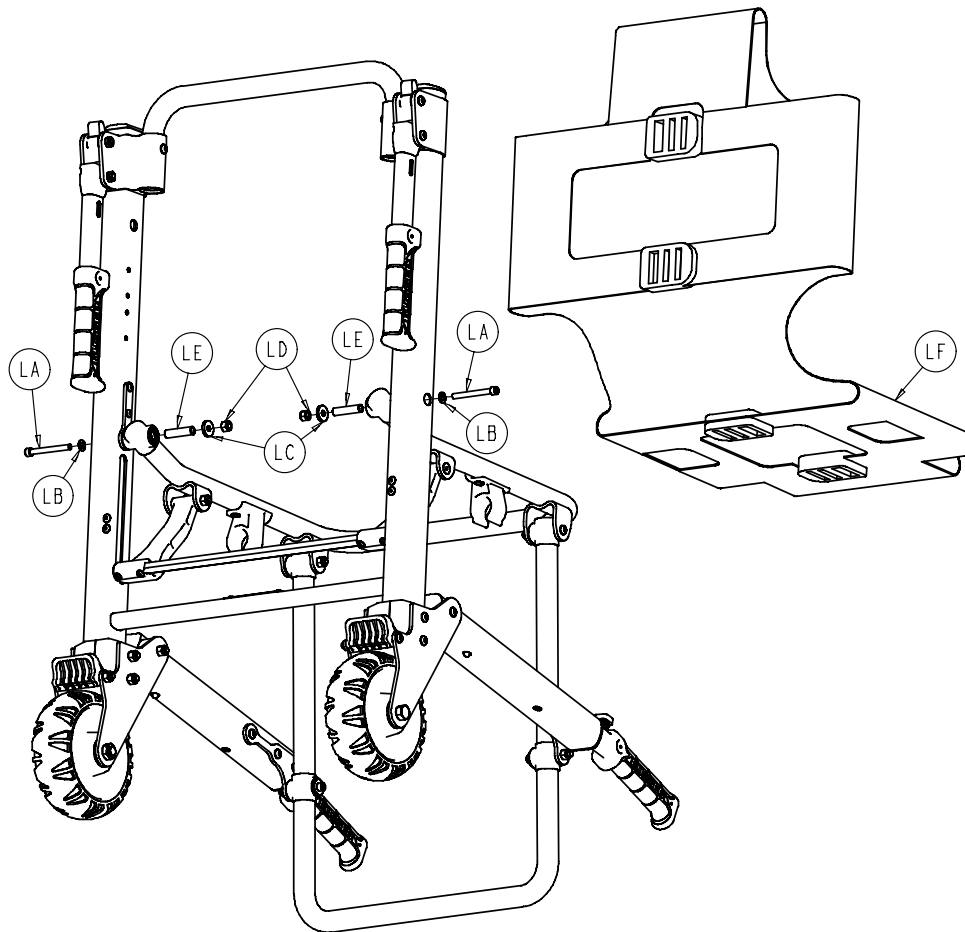

Élément	Numéro	Nom	Quantité
LA	0004-517-000	Vis d'assemblage à six pans creux	2
LB	0011-064-000	Rondelle	2
LC	0011-209-000	Rondelle	2
LD	0016-028-000	Écrou hexagonal Nylock	2
LE	6250-001-098	Entretoise pivotante	2
LF	6250-001-135	Siège en vinyle	1


# 6251/6252 option siège ABS - 6250-021-000

Rév. D (référence uniquement)

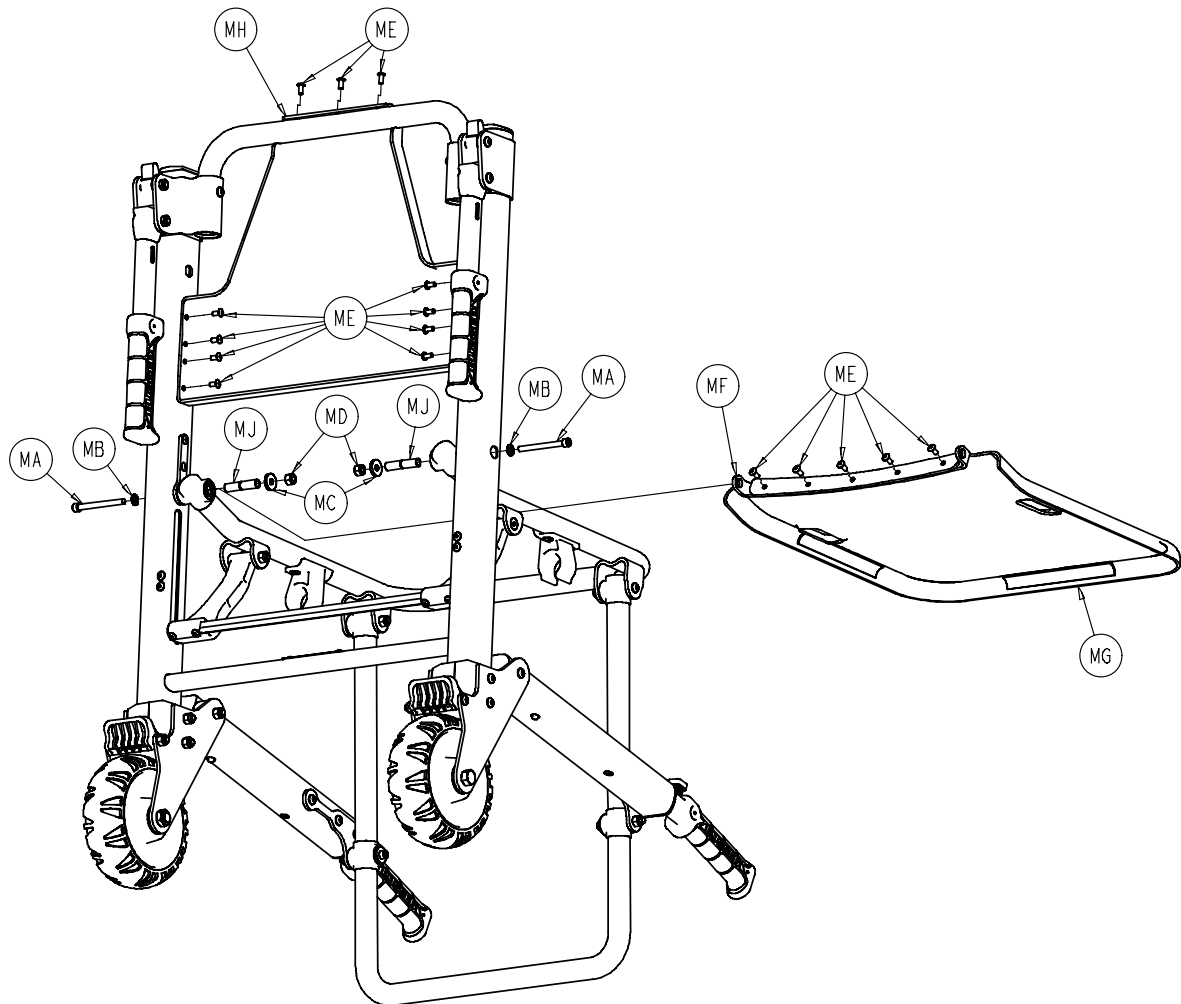


Élément	Numéro	Nom	Quantité
MA	0004-517-000	Vis d'assemblage à six pans creux	2
MB	0011-064-000	Rondelle	2
MC	0011-209-000	Rondelle	2
MD	0016-028-000	Écrou hexagonal Nylock	2
ME	0025-172-000	Rivet aveugle	16
MF	6250-001-099	Support de siège	1
MG	6250-001-115	Siège en plastique	1
MH	6250-001-116	Relève-buste en plastique	1
MJ	6250-001-128	Entretoise pivotante	2


## Options de siège et de dossier

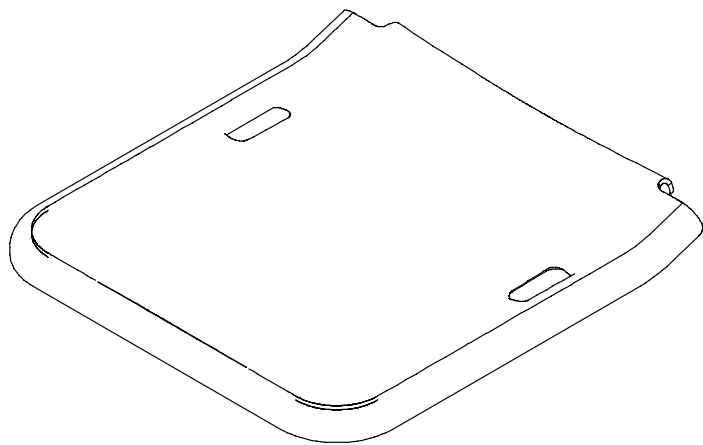

Siège en plastique ABS - 6250-001-115 (rév. C)  
Option de siège ABS - 6250-021-000 (rév. D)

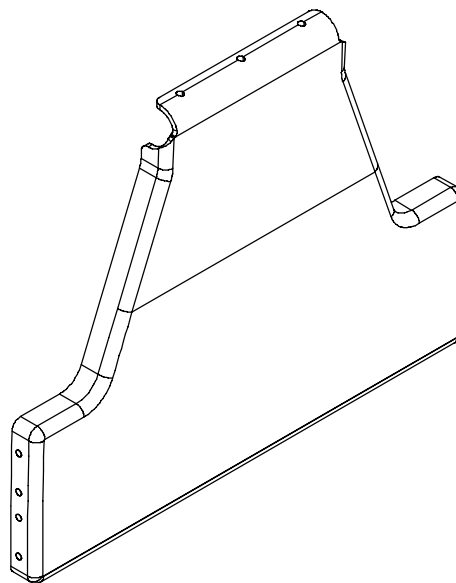

Relève-buste en plastique ABS - 6250-001-116 (rév. C)

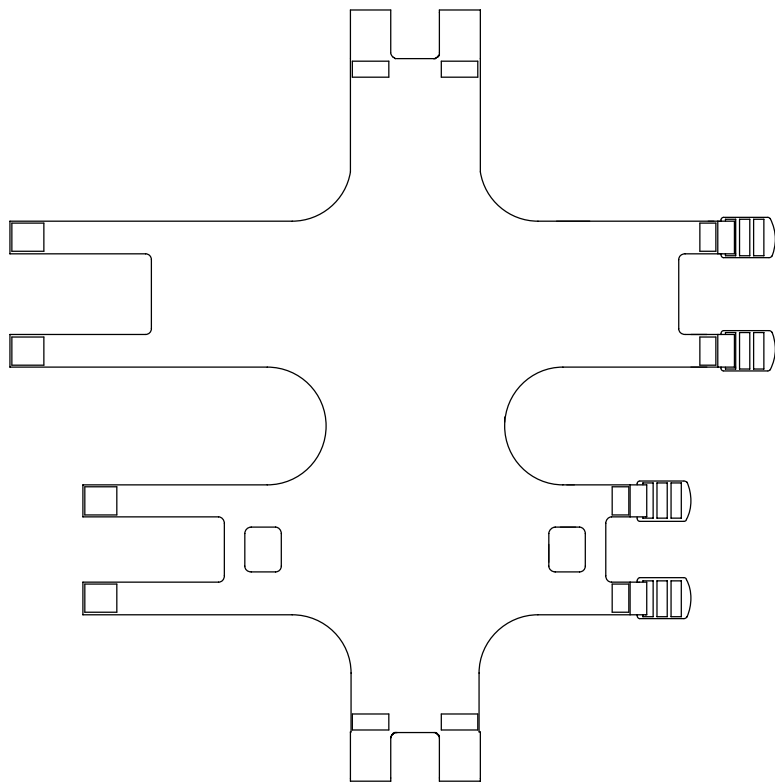


Siège en vinyle - 6250-001-135 (rév. AA)  
Option de siège en vinyle - 6250-020-000 (rév. E)



## 6252 options de repose-tête

6252-001-122 rév. D/6252-001-140 rév. C (référence uniquement)

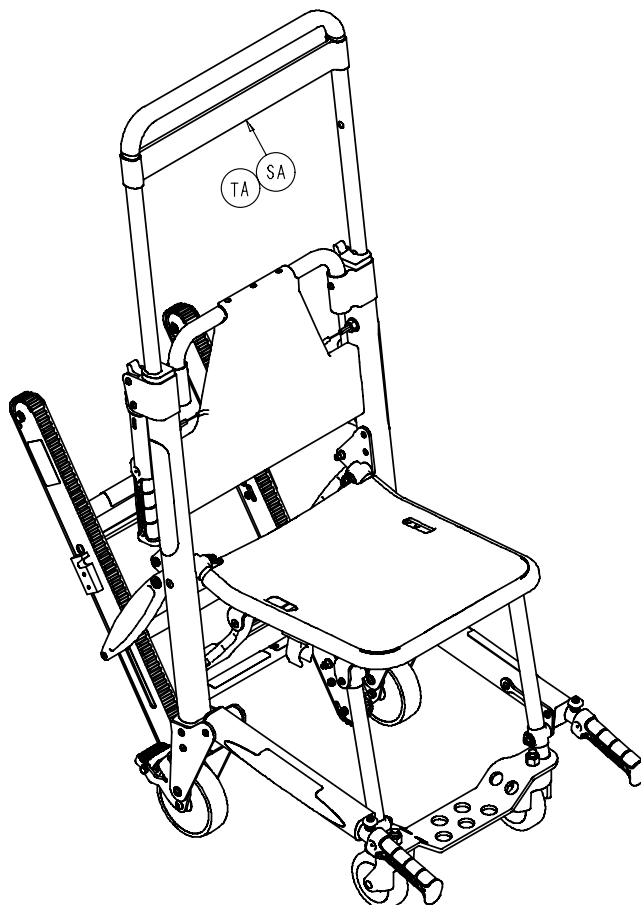

### Option d'appuie-tête - 6252-040-000 rév. B


Élément	Numéro	Nom	Quantité
SA	6252-001-122	Appuie-tête	1

### Appuie-tête en vinyle en option - 6252-041-000 rév. B

Élément	Numéro	Nom	Quantité
TA	6252-001-140	Appuie-tête, vinyle	1

# Système de retenue, boucles non absorbantes/métalliques en option - 6250-161-000


Rév. B (référence uniquement)

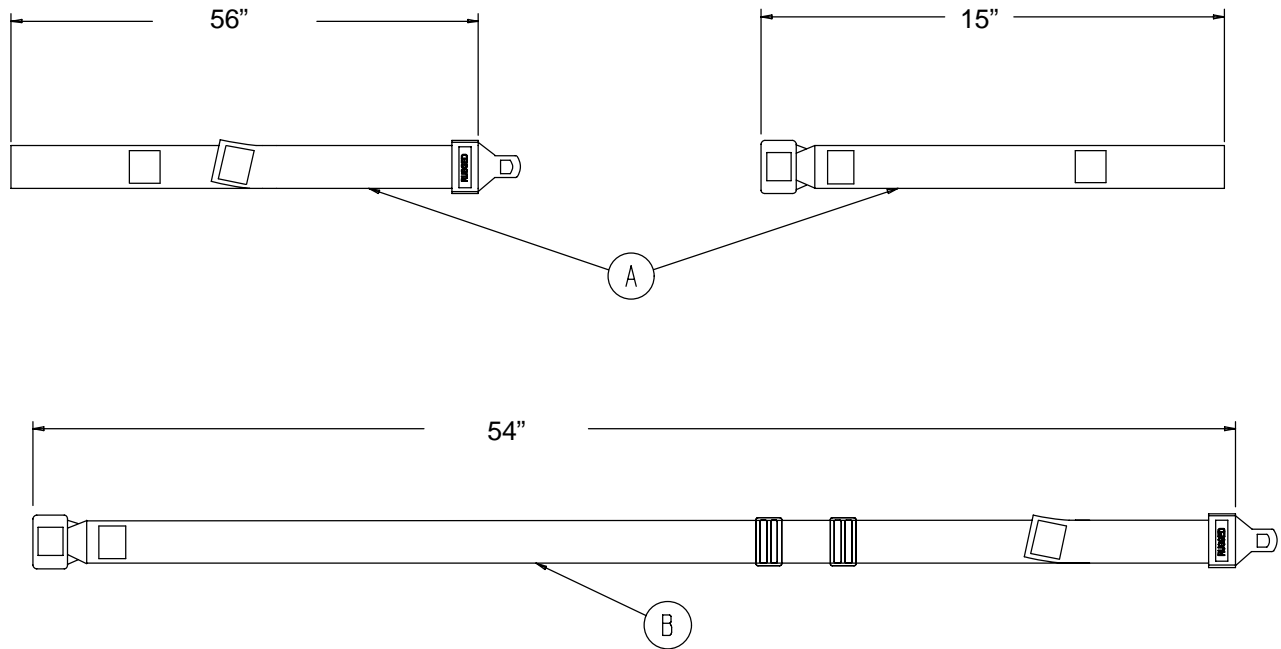

Élément	Numéro	Nom	Quantité
A	6250-001-143	Sangle de retenue de poitrine en vinyle	2
B	6250-001-144	Sangle de retenue des chevilles en vinyle	1

# Systeme de retenue, boucles en polyester/metal en option - 6250-162-000




Rév. B (référence uniquement)

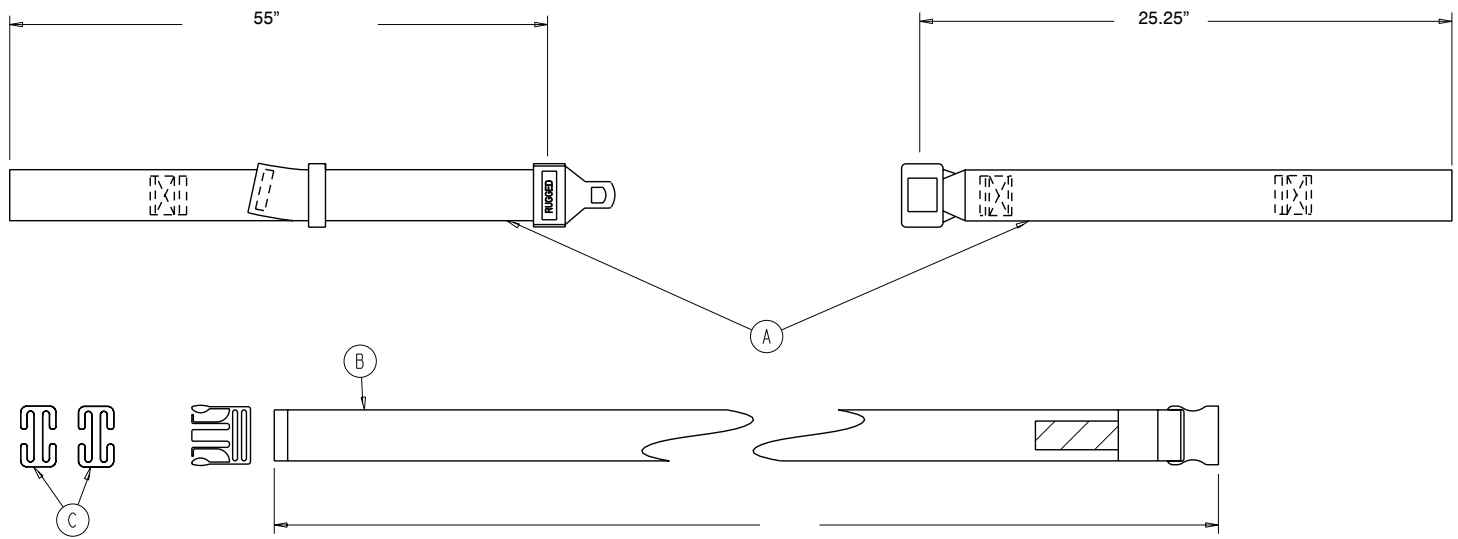

Élément	Numéro	Nom	Quantité
A	6060-160-044	Ensemble de ceinture ventrale	2
B	6250-001-127	Sangle de retenue des chevilles	1
C	6250-001-163	Boucle de retenue	2

# Système de retenue, boucles en polypropylène/plastique en option - 6250-160-000


Rév. D (référence uniquement)

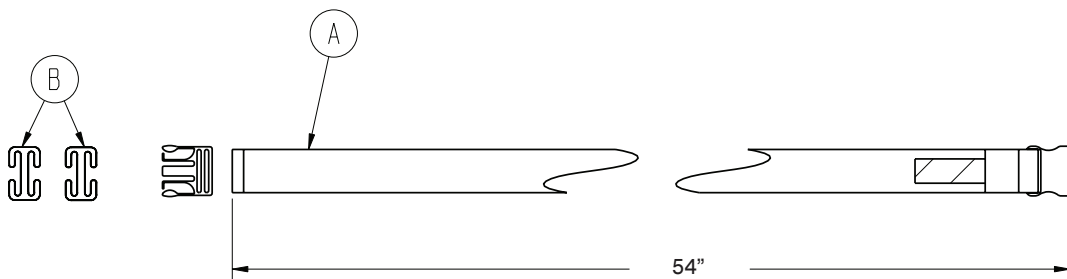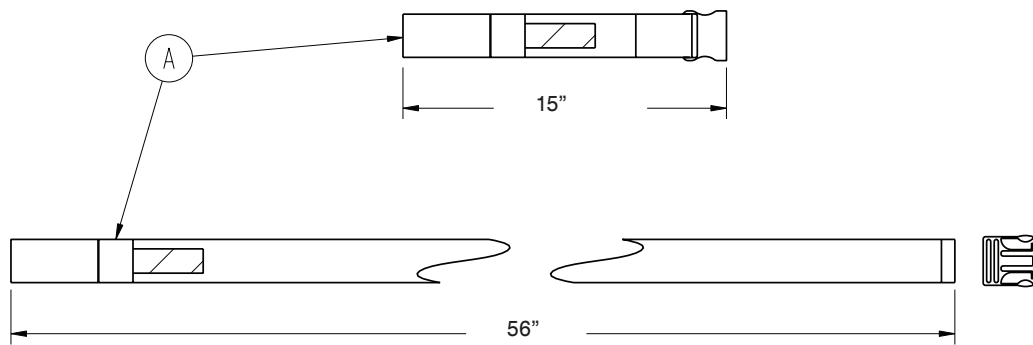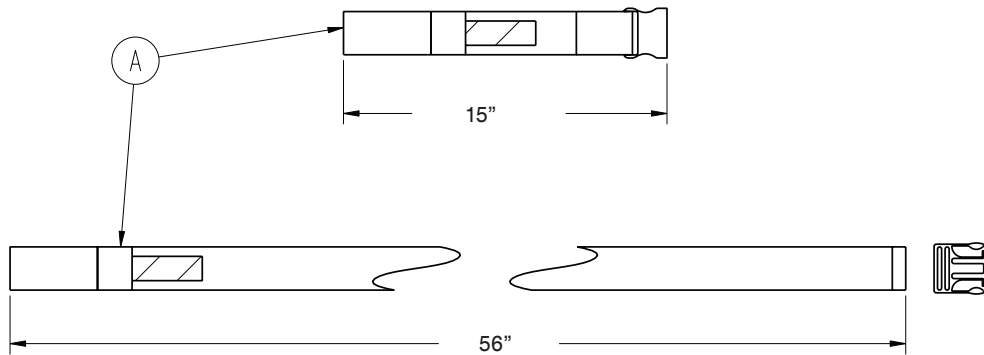

Élément	Numéro	Nom	Quantité
A	6250-001-018	Jeu de sangles de retenue	1
B	6250-001-163	Boucle de retenue	2


# Repose-tête en vinyle en option - 6252-001-140

Rév. C (référence uniquement)

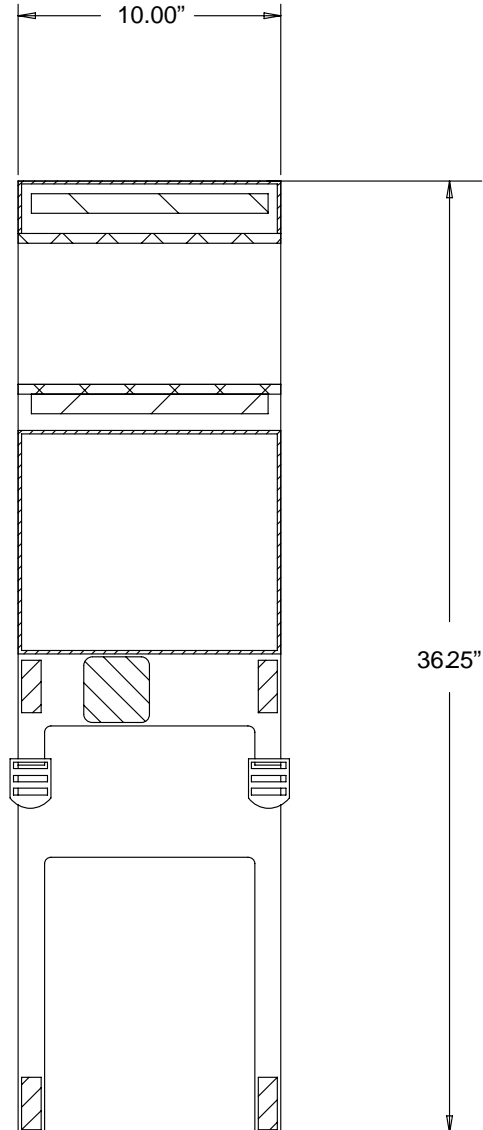

# Support de bouteille d'oxygène élastique en option - 6250-140-000

Rév. A (référence uniquement)

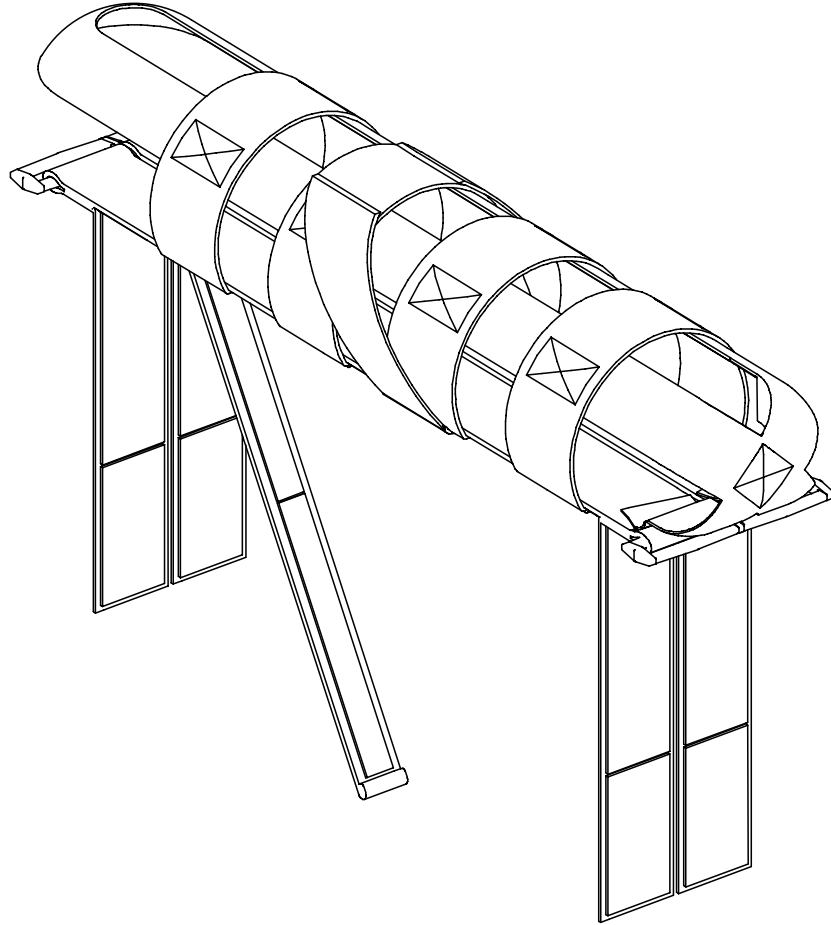

Élément	Numéro	Nom	Quantité
A	6250-140-080	Support de bouteille d'oxygène élastique	1



# stryker

Stryker Corporation or its divisions or other corporate affiliated entities own, use or have applied for the following trademarks or service marks: **RUGGED, Stair-PRO, Stair-TREAD, Stryker**. All other trademarks are trademarks of their respective owners or holders.



Stryker Medical  
3800 E. Centre Avenue  
Portage, MI 49002  
USA