

## Chaise d'évacuation

Manuel d'entretien

REF 6254





# Table des matières

Définition de « Avertissement », « Mise en garde » et « Remarque » .....	2
Résumé des mesures de sécurité .....	2
Introduction à l'entretien .....	3
Durée de vie utile prévue .....	3
Coordonnées .....	3
Emplacement du numéro de série .....	3
Entretien préventif .....	4
Fiche d'entretien .....	5
Documentation sur la formation .....	6
Entretien .....	7
Réglage de la force de verrouillage des roues .....	7
Remise en état de la ceinture du guide .....	7
Remplacement du câble de la poignée de commande supérieure .....	9
Remplacement d'une roulette avant .....	10
Ensemble de chaise .....	12
Ensemble de cadre principal .....	16
Ensemble de poignée d'extension supérieure .....	19
Ensemble de cadre de guide, ceinture standard .....	20
Ensemble de cadre de guide, ceinture agressive .....	22
Mécanisme de verrouillage interne - 6252-001-014 .....	24
Mécanisme de verrouillage interne - 6252-001-015 .....	25
Ensemble de câble et broche .....	26
Poignée relevable verrouillable en option - 6250-031-000 .....	27
Ensemble de section pieds .....	28
Ensemble de poignée d'extension, droite .....	29
Ensemble de poignée d'extension, gauche .....	31
Repose-pieds en option - 6254-029-000 .....	32
Pas de repose-pieds en option - 6254-030-000 .....	33
Ensemble de repose-pieds .....	34
Ensemble de section siège .....	35
Ensemble de poignée relevable .....	36
Ensemble de mécanisme de verrouillage .....	37
Support de bouteille d'oxygène élastique en option - 6250-140-000 .....	38

# Définition de « Avertissement », « Mise en garde » et « Remarque »

Les termes **AVERTISSEMENT**, **MISE EN GARDE** et **REMARQUE** ont une signification particulière et doivent faire l'objet d'une lecture attentive.

## **AVERTISSEMENT**

Avertit le lecteur d'une situation qui, si elle n'est pas évitée, pourrait entraîner la mort ou des blessures graves. Peut également attirer l'attention sur l'existence potentielle d'effets indésirables graves ou de risques d'accident.

## **MISE EN GARDE**

Avertit le lecteur d'une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, peut causer des blessures mineures ou modérées à l'utilisateur ou au patient ou endommager le matériel en question ou d'autres biens. Couvre notamment les précautions à prendre afin d'assurer l'utilisation sûre et efficace du dispositif et d'éviter les dommages qui pourraient découler de l'usage ou du mésusage du matériel.

**Remarque** - Fournit des informations spécifiques destinées à faciliter l'entretien ou à clarifier des instructions importantes.

## **Résumé des mesures de sécurité**

Toujours lire et respecter scrupuleusement les avertissements et les mises en garde indiqués sur cette page. Tout entretien doit être effectué exclusivement par du personnel qualifié.

---

### **AVERTISSEMENT**

- Ne pas poncer les dents du guide. Une déformation des dents peut entraîner des performances imprévisibles de la chaise, entraînant des blessures pour les opérateurs et/ou l'occupant.
-

## Introduction à l'entretien

Ce manuel vous aide à entretenir le produit Stryker concerné. Lire ce manuel pour entretenir ce produit. Ce manuel ne traite pas du fonctionnement de ce produit. Consulter le manuel d'utilisation pour les instructions d'utilisation. Pour consulter le manuel d'utilisation ou le manuel d'entretien en ligne, aller sur le site <https://techweb.stryker.com/>.

## Durée de vie utile prévue

La chaise d'évacuation a une durée de vie utile prévue de sept ans dans des conditions d'utilisation normale et en respectant la maintenance périodique appropriée.

## Coordonnées

Contactez le service clientèle ou le support technique de Stryker au moyen des coordonnées suivantes : 1-800-327-0770.


Stryker Medical  
3800 E. Centre Avenue  
Portage, MI 49002  
USA

**Remarque** - L'utilisateur et/ou l'occupant doivent signaler tout incident grave lié au produit à la fois au fabricant et à l'autorité compétente de l'État membre de l'Union européenne où l'utilisateur et/ou l'occupant sont établis.

Pour consulter votre mode d'emploi ou votre manuel d'entretien en ligne, consultez <https://techweb.stryker.com/>.

Avoir le numéro de série (A) du produit Stryker à disposition avant d'appeler le service clientèle ou le support technique de Stryker. Inclure le numéro de série dans toutes les communications écrites.

## Emplacement du numéro de série

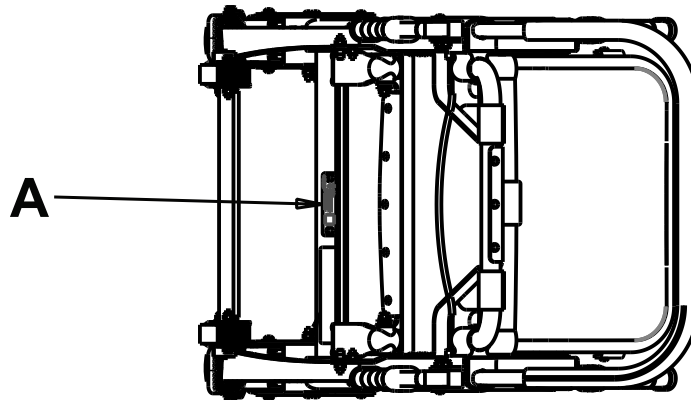

# Entretien préventif

Mettre le produit hors service avant d'effectuer l'inspection d'entretien préventif. Vérifier tous les éléments mentionnés pendant l'entretien préventif annuel pour tous les produits Stryker Medical. Il peut être nécessaire d'effectuer les vérifications d'entretien préventif plus fréquemment en fonction du degré d'utilisation du produit. Toute réparation doit être effectuée exclusivement par du personnel qualifié.

**Remarque** - Nettoyer et désinfecter l'extérieur de la surface de support avant inspection, le cas échéant.

Fonctionnement	Calendrier	Procédure
Nettoyage et désinfection	Chaque utilisation	Voir la rubrique <i>Nettoyage</i> dans le manuel d'utilisation
Inspection	Procéder au contrôle de la chaise tous les 6 mois	Voir la liste de contrôle ci-dessous
Remise en état de la ceinture du système <b>Stair-TREAD</b>	Après l'utilisation sur environ 500 escaliers, ou si la performance du système <b>Stair-TREAD</b> est lente	Voir la section <i>Remise en état de la ceinture du guide</i> dans le manuel de maintenance

Inspecter les éléments suivants :

- \_\_\_\_\_ Toutes les attaches sont solidement fixées (consulter tous les schémas de montage)
- \_\_\_\_\_ Toutes les soudures sont intactes, absence de fissures ou de cassures
- \_\_\_\_\_ Les tubulures et les feuilles de métal ne sont ni pliées ni cassées
- \_\_\_\_\_ Absence de débris dans les roues
- \_\_\_\_\_ Toutes les roues sont solidement fixées et roulent
- \_\_\_\_\_ Les roulettes avant sont solidement fixées, roulent et pivotent (le cas échéant)
- \_\_\_\_\_ Les blocages de roue fixent les roues quand ils sont activés et les libèrent quand ils sont désactivés
- \_\_\_\_\_ La chaise se déplie et se verrouille
- \_\_\_\_\_ Le siège et le relève-buste ne présentent ni déchirure ni fissure
- \_\_\_\_\_ Les sangles de retenue sont intactes et fonctionnent
- \_\_\_\_\_ Les poignées de support côté pieds se déploient et se verrouillent en place
- \_\_\_\_\_ Les poignées de support côté tête se plient et se déplient
- \_\_\_\_\_ La poignée de commande supérieure se déploie et se verrouille dans toutes les positions
- \_\_\_\_\_ Le mécanisme du système **Stair-TREAD** se déplie et se verrouille en place (le cas échéant)
- \_\_\_\_\_ La ceinture du système **Stair-TREAD** s'enroule (le cas échéant)
- \_\_\_\_\_ Les cordons internes de la ceinture du système **Stair-TREAD** ne sont pas visibles ; remplacer si nécessaire (le cas échéant)
- \_\_\_\_\_ Le système **Stair-TREAD** fonctionne comme souhaité ; remettre les ceintures en état si nécessaire (le cas échéant)
- \_\_\_\_\_ Absence de lubrifiant sur les ceintures du système **Stair-TREAD** ou sur les surfaces du cadre du guide
- \_\_\_\_\_ Le câble de la poignée de déblocage supérieure n'est pas usé ni effiloché ; le remplacer si nécessaire
- \_\_\_\_\_ Les accessoires et les pièces sont intacts et fonctionnent

Numéro de série du produit :
Effectué par :
Date :

# Fiche d'entretien

Date	Opération d'entretien exécutée	Par	Heures

## Documentation sur la formation

	Date de la formation		
Nom du stagiaire	Formation de base	Programme de mise à jour	Manuel d'utilisation, en service, cours formel, etc.



# Entretien

## Réglage de la force de verrouillage des roues

### Outils requis :

- Clé hexagonale de 5/32 po
- Clé mixte ou douille de 7/16 po

### Procédure :

1. À l'aide d'une clé hexagonale de 5/32 po et d'une clé mixte de 7/16 po ou d'une douille, retirer la vis à tube du centre de la pédale de verrouillage. Conserver la vis. Le blocage de roue est initialement assemblé avec la pédale réglée sur la force de verrouillage minimale. Le repère sur la pédale (A) est aligné avec le repère sur la gaine octogonale (B) (Figure 1).
2. Retirer la gaine octogonale (B). Tourner la gaine octogonale dans le sens antihoraire pour augmenter la force de verrouillage de la pédale et dans le sens horaire pour la diminuer. Insérer la gaine octogonale dans la pédale.
3. À l'aide d'une clé hexagonale de 5/32 po et d'une clé mixte ou d'une douille de 7/16 po, réinstaller la vis à douille (retirée à l'étape 1).
4. Tester la force de verrouillage de la pédale et s'assurer que la pédale est maintenue avant de remettre le produit en service.

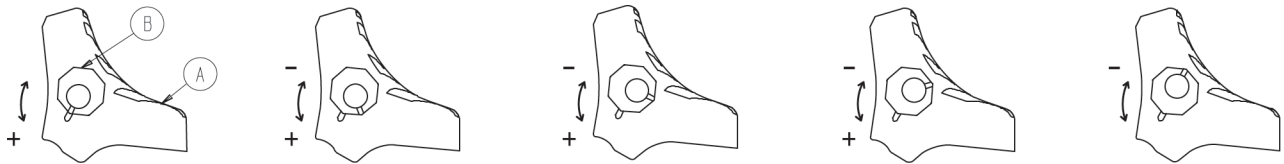


Figure 1 – Réglage de la force de verrouillage des roues

## Remise en état de la ceinture du guide

### Outils requis :

- (2) Clés de 7/16 po
- Marqueur permanent
- Papier de verre grain 50
- Bloc de ponçage

### Procédure :

1. Déployer la poignée de commande supérieure, ouvrir les rails du système **Stair-TREAD** et incliner la chaise vers l'avant jusqu'à ce qu'elle repose sur la poignée et la section siège (Figure 2).
2. À l'aide de deux clés de 7/16 po, retirer le boulon à tête hexagonale, l'écrou hexagonal, deux rondelles, l'entretoise et la roue des deux côtés du cadre du guide. Retirer la roue et l'entretoise vers le bas en direction du sol (Figure 3). Conserver toutes les pièces.



Figure 2 – Incliner la chaise vers l'avant

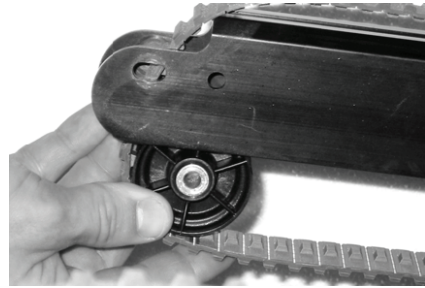


Figure 3 – Retirer l'entretoise de la roue en direction du sol

3. Retourner les deux ceintures de sorte que les petites dents internes soient à l'extérieur. Placer les ceintures sur le cadre du guide pour les soutenir pendant le ponçage.

**Remarque** - Les nouvelles ceintures de guide doivent être installées si les cordons internes sont exposés sur les surfaces d'usure.

4. Pour une référence de point de début/fin, utiliser un marqueur permanent pour colorer une dent sur la ceinture (Figure 4).




Figure 4 – Marquer une dent de ceinture comme référence

5. À l'aide d'un bloc de ponçage avec du papier de verre grain 50, poncer les deux surfaces d'usure sur les bords extérieurs de chaque ceinture. L'objectif est de rendre la surface de la ceinture suffisamment rugueuse pour éliminer les taches brillantes causées par l'usure normale. Ne pas poncer excessivement les ceintures (Figure 5 et Figure 6).


---

**AVERTISSEMENT** - Ne pas poncer les dents du guide. Une déformation des dents peut entraîner des performances imprévisibles de la chaise, entraînant des blessures pour les opérateurs et/ou l'occupant.

---

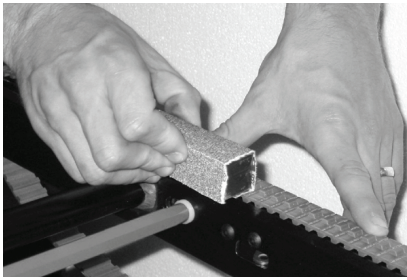

**Figure 5 – Ponçage des surfaces d'usure**

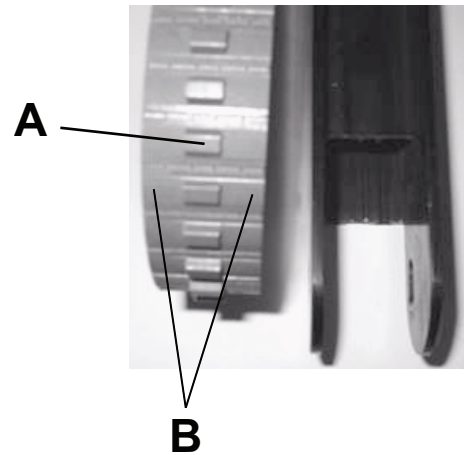

**Figure 6 – Surfaces de ponçage de la ceinture**

**A** : Ne pas poncer les dents du guide

**B** : Surfaces de ponçage de la ceinture


6. Retirer tous les débris de ponçage des ceintures et du cadre du guide.
7. Retourner les deux ceintures de sorte que les grandes dents soient à l'extérieur.
8. À l'aide de deux clés de 7/16 po, remplacer le boulon à tête hexagonale, l'écrou hexagonal, deux rondelles, l'entretoise et la roue des deux côtés du cadre du guide.
9. Utiliser deux clés de 7/16 po pour appliquer la tension souhaitée à chaque ceinture et bien serrer (Figure 7).

**Remarque** - Pour vérifier la tension, tirer sur le centre de la ceinture jusqu'à ce qu'elle soit tendue. L'écart entre la ceinture et le cadre du guide doit mesurer entre 3/8 po et 1 po (Figure 8).

10. Faire tourner les ceintures pour s'assurer qu'elles roulent librement.



**Figure 7 – Utiliser des clés pour appliquer une tension sur la ceinture**

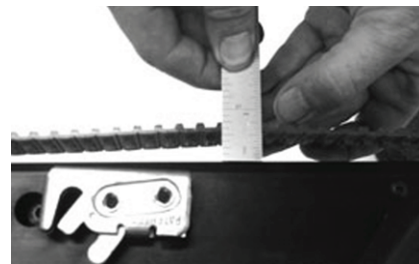

**Figure 8 – Tension adéquate de la ceinture**

11. S'assurer du fonctionnement correct du produit avant de le remettre en service.

## Remplacement du câble de la poignée de commande supérieure

**Outils requis :**

- Clé de 5/8 po


**Procédure :**

1. Tirer le câble et élever la poignée de commande supérieure extensible en position complètement déployée (Figure 9).

2. À l'aide d'une clé de 5/8 po, retirer un côté du câble (Figure 10).



**Figure 9 – Élever la poignée de commande supérieure extensible**

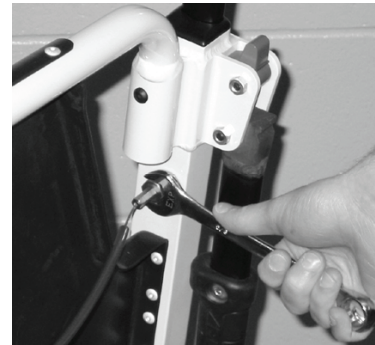

**Figure 10 – Retirer un côté du câble**

3. Placer la rondelle à l'extrémité du nouveau câble (Figure 11).
4. À l'aide d'une clé de 5/8 po, fixer un côté du nouveau câble au châssis de la chaise dans le trou où l'ancien câble a été retiré (Figure 12).



**Figure 11 – Placer la rondelle sur le nouveau câble**



**Figure 12 – Fixer un côté du nouveau câble**

5. Répéter les étapes 2 à 4 pour l'autre extrémité du câble.
6. S'assurer du fonctionnement correct du produit avant de le remettre en service.


## Remplacement d'une roulette avant

### Outils requis :

- Clé mixte de 3/4 po
- Clé hexagonale de 3/8 po avec extrémité sphérique

### Procédure :

1. Poser la chaise sur le dos.
2. À l'aide d'une clé mixte de 3/4 po et d'une clé hexagonale de 3/8 po avec extrémité sphérique, retirer l'écrou hexagonal Nylock (A) qui permet de fixer l'ensemble de roulette (B) à la section pieds (C) (Figure 13). Jeter la roulette et l'écrou.

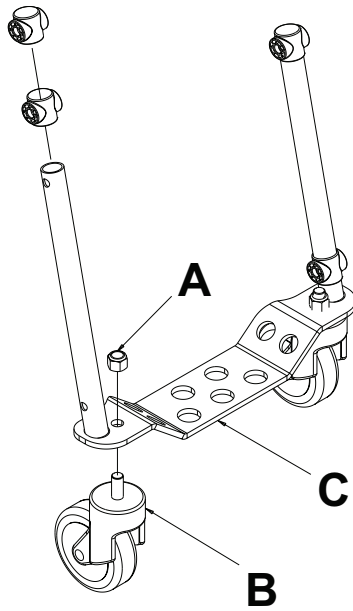



**Figure 13 – Retrait de la roulette**


3. Inverser les étapes pour installer la roulette fournie et l'écrou hexagonal Nylock fourni.
4. S'assurer du fonctionnement correct du produit avant de le remettre en service.

# Ensemble de chaise

6254-001-005 rév. AA (référence uniquement)

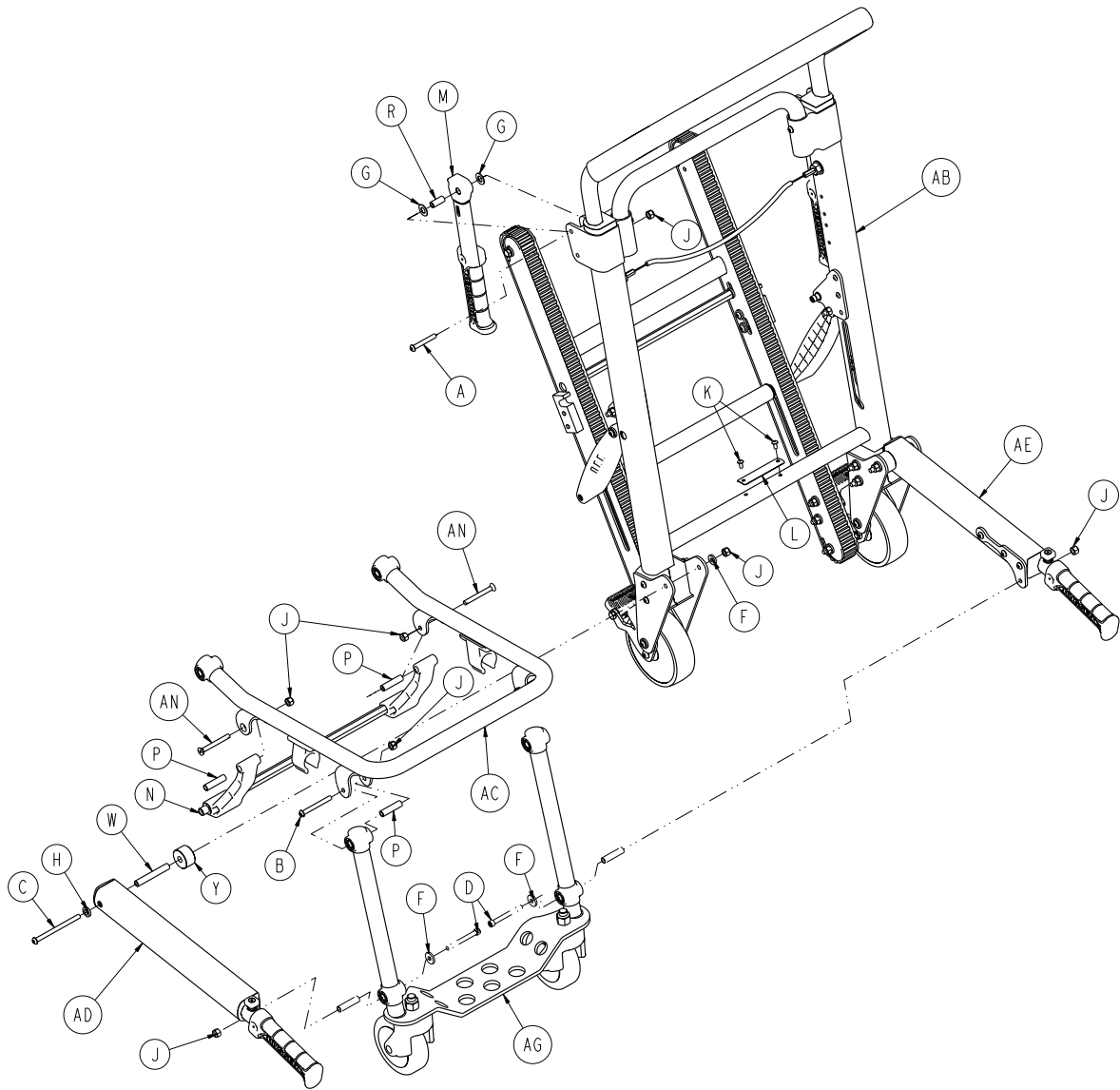

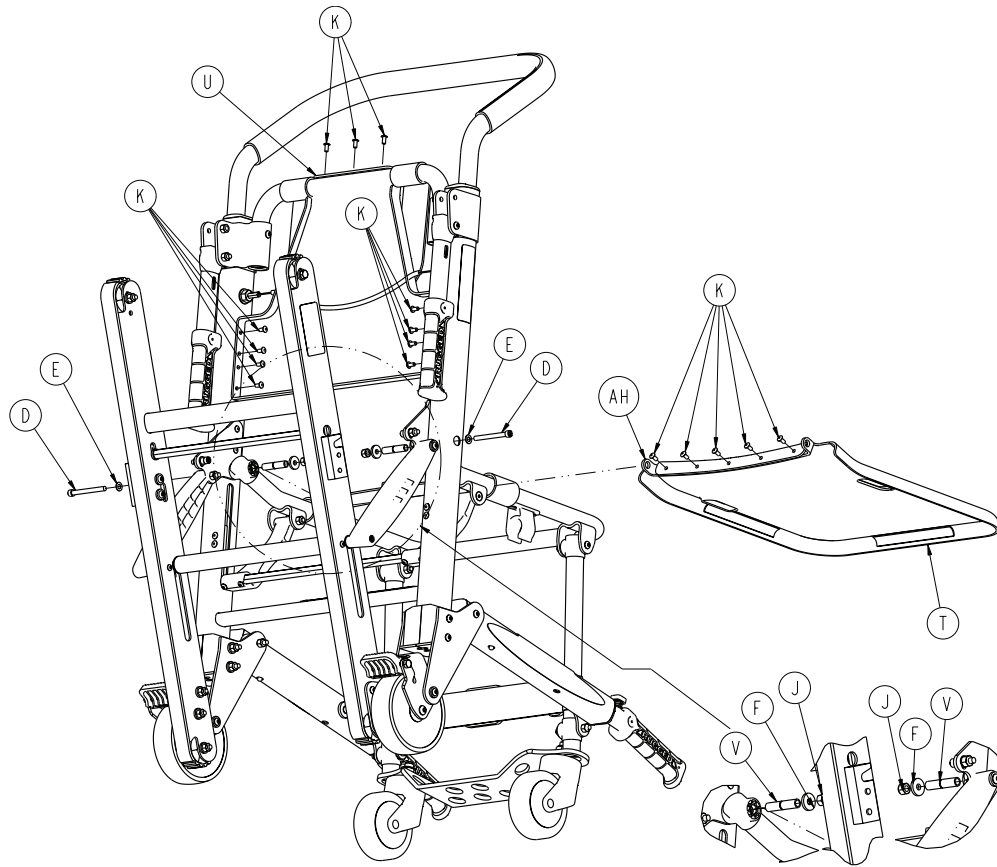

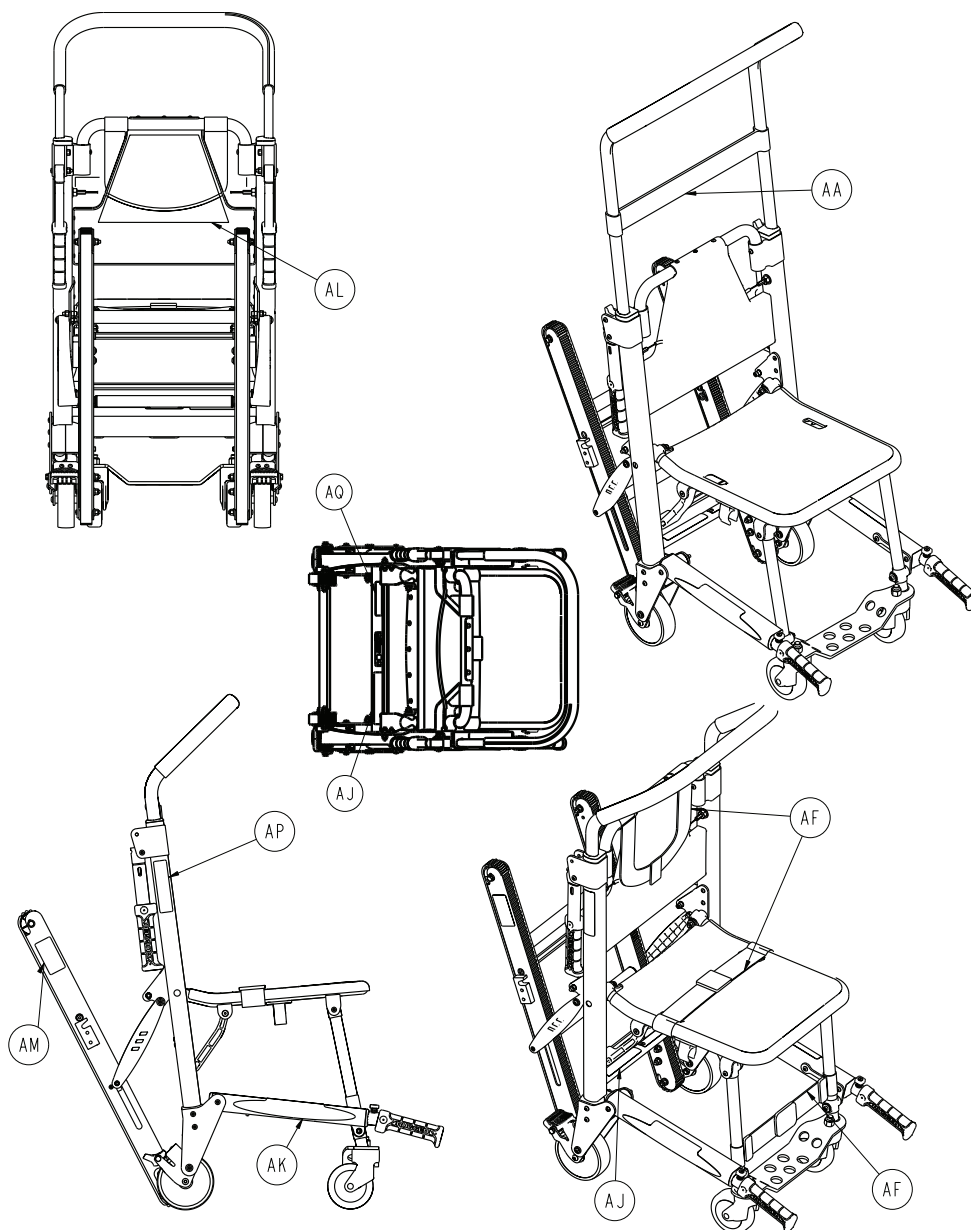


Élément	Número	Nom	Quantité
A	0004-204-000	Vis d'assemblage à tête ronde	2
B	0004-163-000	Vis d'assemblage à tête ronde	2
C	0004-235-000	Vis d'assemblage à tête ronde	2
D	0004-517-000	Vis d'assemblage à six pans creux	4
E	0011-064-000	Rondelle	2
F	0011-209-000	Rondelle	6
G	0014-020-000	Rondelle	4
H	0014-099-000	Rondelle	2
J	0016-028-000	Écrou hexagonal Nylock	12
K	0025-172-000	Rivet aveugle	18
L	6254-001-926	Étiquette avec numéro de série 6254	1
M	6250-001-016	Ensemble de poignée relevable (page 36)	2
N	6250-001-017	Ensemble de mécanisme de verrouillage (page 37)	1




Élément	Numéro	Nom	Quantité
P	6250-001-098	Entretoise pivotante	4
R	6250-001-111	Entretoise pivotante de poignée relevable	2
T	6250-001-115	Siège en plastique	1
U	6250-001-116	Relève-buste en plastique	1
V	6250-001-128	Entretoise pivotante	2
W	6250-001-129	Entretoise pivotante	2
Y	6250-001-133	Localisateur de poignée étendu	2
AA	6254-001-222	Appuie-tête	1
AB	6254-101-011	<i>Ensemble de cadre principal (page 16)</i>	1
AC	6254-001-013	<i>Ensemble de section siège (page 35)</i>	1
AD	6254-001-014	<i>Ensemble de poignée d'extension, droite (page 29)</i>	1
AE	6254-001-015	<i>Ensemble de poignée d'extension, gauche (page 31)</i>	1
AF	6253-001-018	Jeu de sangles de retenue	1
AG	6254-001-025	<i>Ensemble de section pieds (page 28)</i>	1
AH	6254-001-099	Support de siège	1
AJ	6254-001-137	Étiquette, spécification 6254	1
AK	6254-001-163	Étiquette, évacuation	2
AL	6253-001-156	Étiquette, instruction	1
AM	6252-001-139	Étiquette, ne pas lubrifier	2
AN	0001-167-000	Vis à empreinte à tête plate	2
AP	6254-001-139	Étiquette, Stryker	2
AQ	639000010901	Étiquette, EAR	1

# Ensemble de cadre principal

6254-101-011 rév. A (référence uniquement)

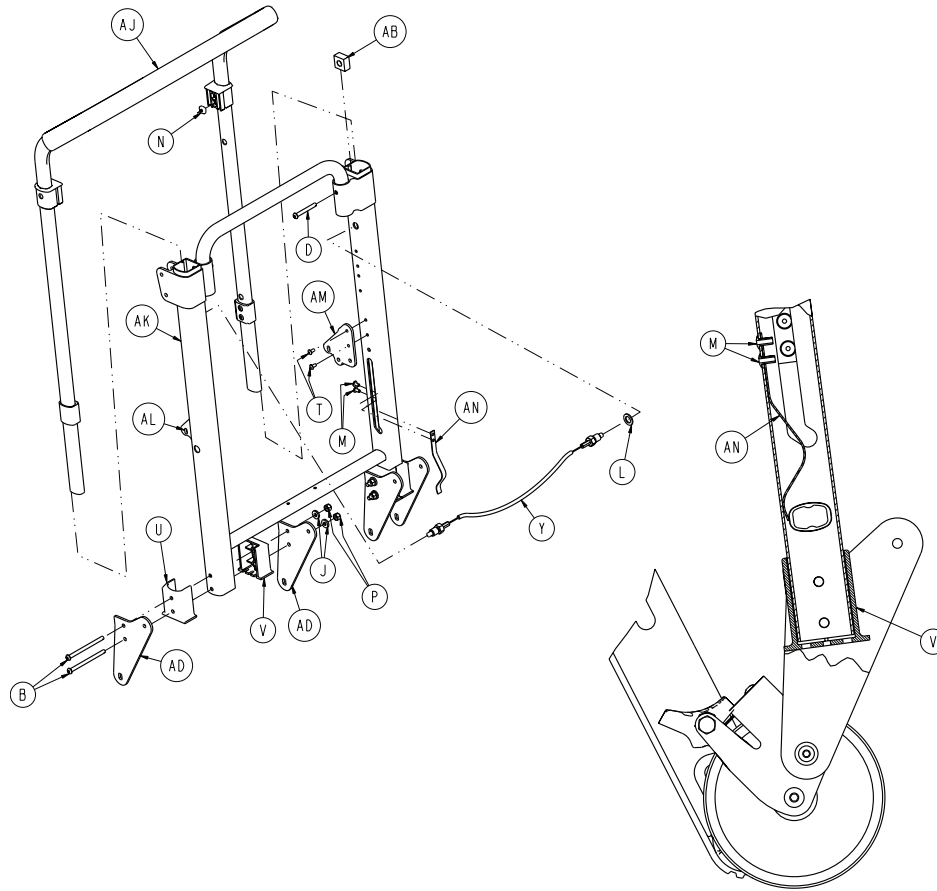

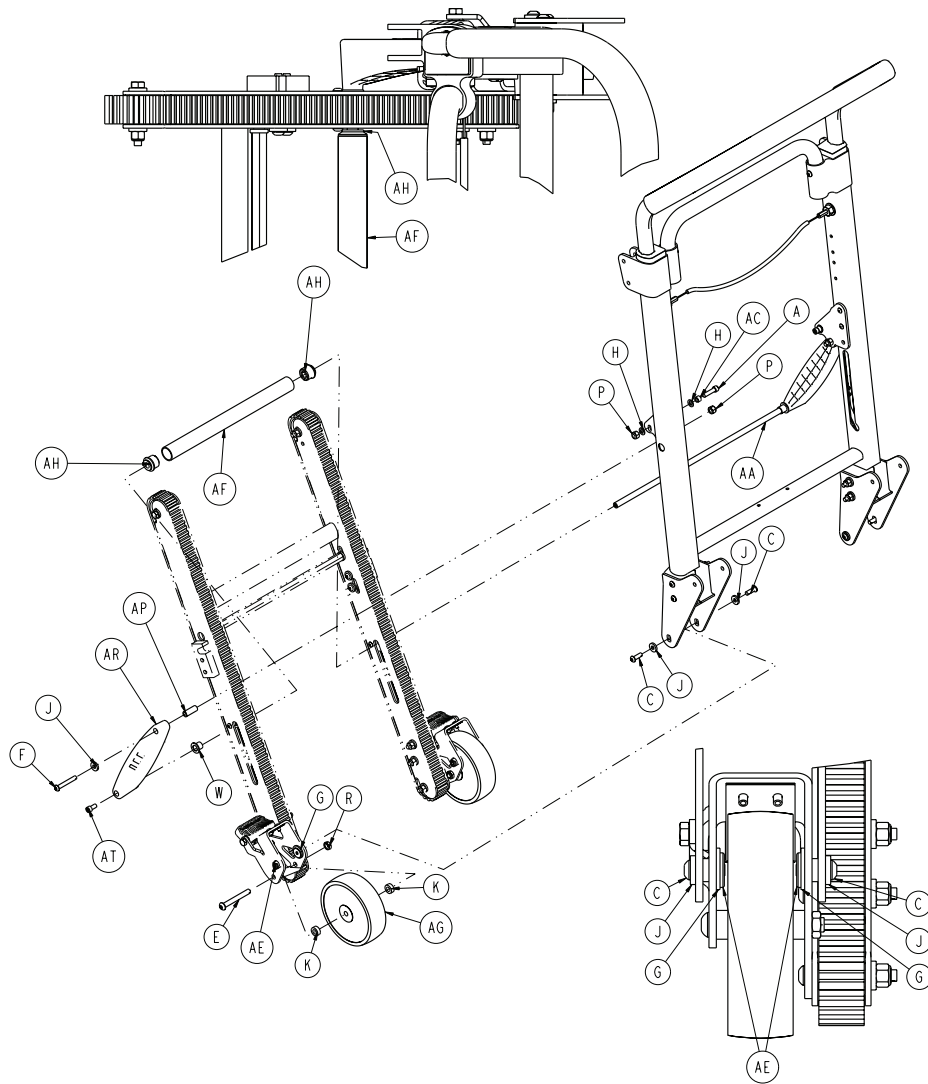


Élément	Numéro	Nom	Quantité
A	0004-028-000	Vis d'assemblage à six pans creux	2
B	0004-235-000	Vis d'assemblage à tête ronde	4
C	0004-468-000	Vis d'assemblage à tête ronde	4
D	0004-511-000	Vis d'assemblage à tête ronde	2
E	0004-512-000	Vis d'assemblage à tête ronde	2
F	0004-204-000	Vis d'assemblage à tête ronde	2
G	0011-045-000	Rondelle	4
H	0011-064-000	Rondelle	4
J	0011-209-000	Rondelle	10
K	0011-423-000	Entretoise	4
L	0011-455-000	Rondelle	2
M	0025-079-000	Rivet aveugle	4
N	0015-016-000	Écrou carré	2
P	0016-028-000	Écrou Nylock	8
R	0016-316-000	Contre-écrou hexagonal Centerlock	2
T	0025-172-000	Rivet aveugle	4
U	6250-001-102	Entretoise de support de roue, externe	2
V	6250-001-103	Entretoise de support de roue, interne	2

Élément	Numéro	Nom	Quantité
W	6250-001-124	Roulement de bride	2
Y	6252-001-016	<i>Ensemble de câble et broche (page 26)</i>	1
AA	6252-001-089	Barre transversale du support de guide	1
AB	6252-001-094	Butée fixe de la poignée d'extension supérieure	2
AC	6252-001-096	Tenon de verrouillage de guide	2
AD	6252-001-104	Estampage du support de roue	4
AE	6252-001-106	Pivot de l'entretoise de guide	4
AF	6252-001-113	Entretoise de tube de guide	1
AG	6252-001-114	Roue de 5 po	2
AH	6252-001-120	Écarteur de gaine du guide	2
AJ	6253-001-012	<i>Ensemble de poignée d'extension supérieure (page 19)</i>	1
AK	6254-001-055	Ensemble soudé du châssis	1
AL	6254-001-124	Support de déport du support de guide	1
AM	6254-001-125	Support de déport du support de guide	1
AN	6250-001-118	Ressort de retenue du mécanisme de verrouillage	2
AP	6254-001-084	Entretoise de support de guide	2
AR	6254-001-088	Entretoise de support de guide	2
AT	0004-514-000	Vis d'assemblage à six pans creux	2

# Ensemble de poignée d'extension supérieure


6253-001-012 rév. B (référence uniquement)

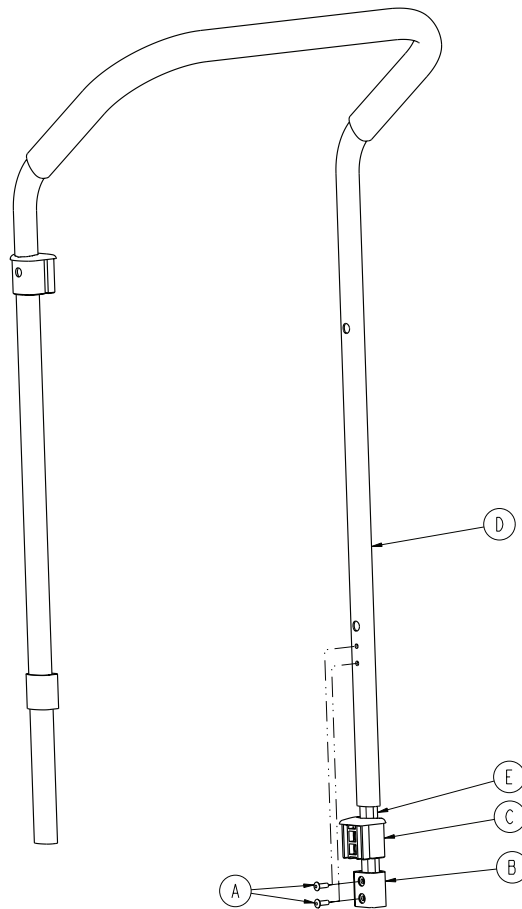

Élément	Numéro	Nom	Quantité
A	0025-133-000	Rivet aveugle	4
B	6250-001-085	Douille coulissante interne	2
C	6250-001-087	Douille pour poignée d'extension externe	2
D	6253-001-090	Poignée interne supérieure	1
E	6253-001-145	Renforceur de poignée	2

# Ensemble de cadre de guide, ceinture standard

6252-001-013 rév. E (référence uniquement)

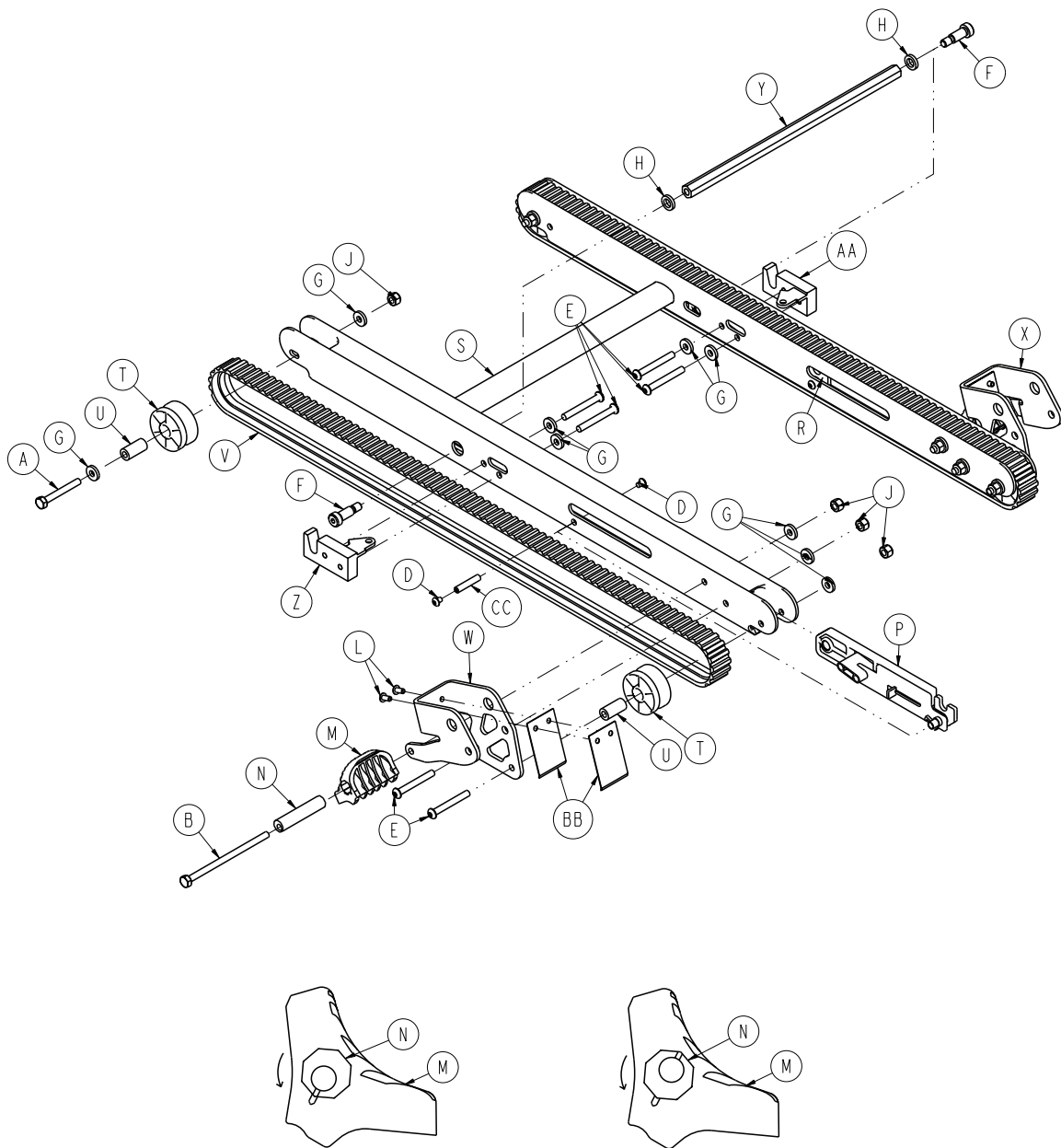


Élément	Numéro	Nom	Quantité
A	0003-358-000	Vis à tête hexagonale	2
B	0003-365-000	Vis à tête hexagonale	2
D	0004-483-000	Vis d'assemblage à tête ronde	4
E	0004-511-000	Vis d'assemblage à tête ronde	8
F	0008-063-000	Vis d'assemblage à six pans creux	2
G	0011-209-000	Rondelle	14
H	0014-099-000	Rondelle	2
J	0016-028-000	Écrou hexagonal	8
L	0025-172-000	Rivet aveugle	4
M	6080-300-030	Pédale de blocage de roulette réglable	2
N	6080-200-041	Gaine hexagonale	2

Élément	Numéro	Nom	Quantité
P	6252-001-014	<i>Mécanisme de verrouillage interne - 6252-001-014 (page 24)</i>	1
R	6252-001-015	<i>Mécanisme de verrouillage interne - 6252-001-015 (page 25)</i>	1
S	6252-001-050	Ensemble soudé du châssis du guide	1
T	6252-001-083	Roulette de la ceinture de guide	4
U	6252-001-084	Entretoise des galets de la ceinture de guide	4
V	6252-001-085	Ceinture de guide	2
W	6252-001-102	Estampage du support de roue	1
X	6252-001-103	Estampage du support de roue	1
Y	6252-001-105	Barre transversale du mécanisme de verrouillage	1
Z	6252-001-110	Loquet	1
AA	6252-001-111	Loquet	1
BB	6252-001-112	Ressort	4
CC	6252-001-121	Verrouillage de l'entretoise interne du pivot	2

# Ensemble de cadre de guide, ceinture agressive

6253-001-020 rév. B (référence uniquement)

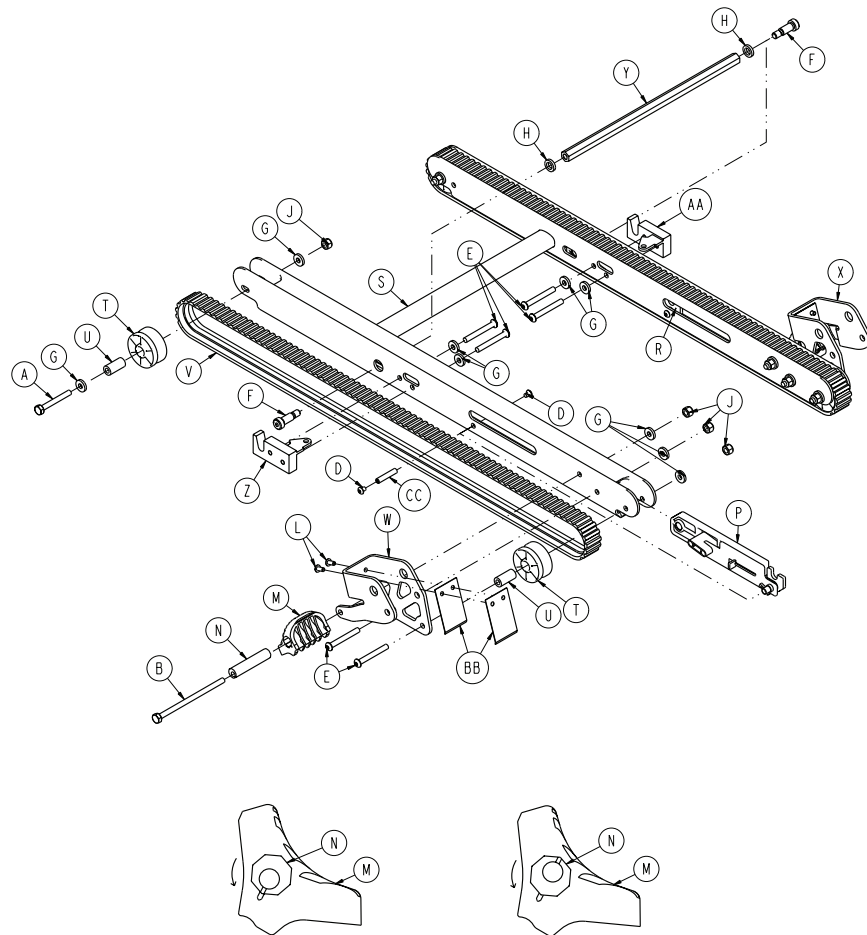


Élément	Numéro	Nom	Quantité
A	0003-358-000	Vis d'assemblage à tête hexagonale	2
B	0003-365-000	Vis d'assemblage à tête hexagonale	2
D	0004-483-000	Vis d'assemblage à tête ronde	4
E	0004-511-000	Vis d'assemblage à tête ronde	8
F	0008-063-000	Vis d'assemblage à six pans creux	2
G	0011-209-000	Rondelle	14
H	0014-099-000	Rondelle	2
J	0016-028-000	Écrou hexagonal	8
L	0025-172-000	Rivet aveugle	4
M	6080-300-030	Pédale de blocage de roulette réglable	2
N	6080-200-041	Gaine hexagonale	2
P	6252-001-014	Mécanisme de verrouillage interne - 6252-001-014 (page 24)	1
R	6252-001-015	Mécanisme de verrouillage interne - 6252-001-015 (page 25)	1
S	6252-001-050	Ensemble soudé du châssis du guide	1
T	6252-001-083	Roulette de la ceinture de guide	4
U	6252-001-084	Entretoise des galets de la ceinture de guide	4
V	6253-001-085	Ceinture de guide filetée agressive	2



Élément	Numéro	Nom	Quantité
W	6253-001-102	Support de roue, droite	1
X	6253-001-103	Support de roue, gauche	1
Y	6252-001-105	Barre transversale du mécanisme de verrouillage	1
Z	6252-001-110	Loquet	1
AA	6252-001-111	Loquet	1
BB	6252-001-112	Ressort	4
CC	6252-001-121	Verrouillage de l'entretoise interne du pivot	2

# Mécanisme de verrouillage interne - 6252-001-014


Rév. B (référence uniquement)

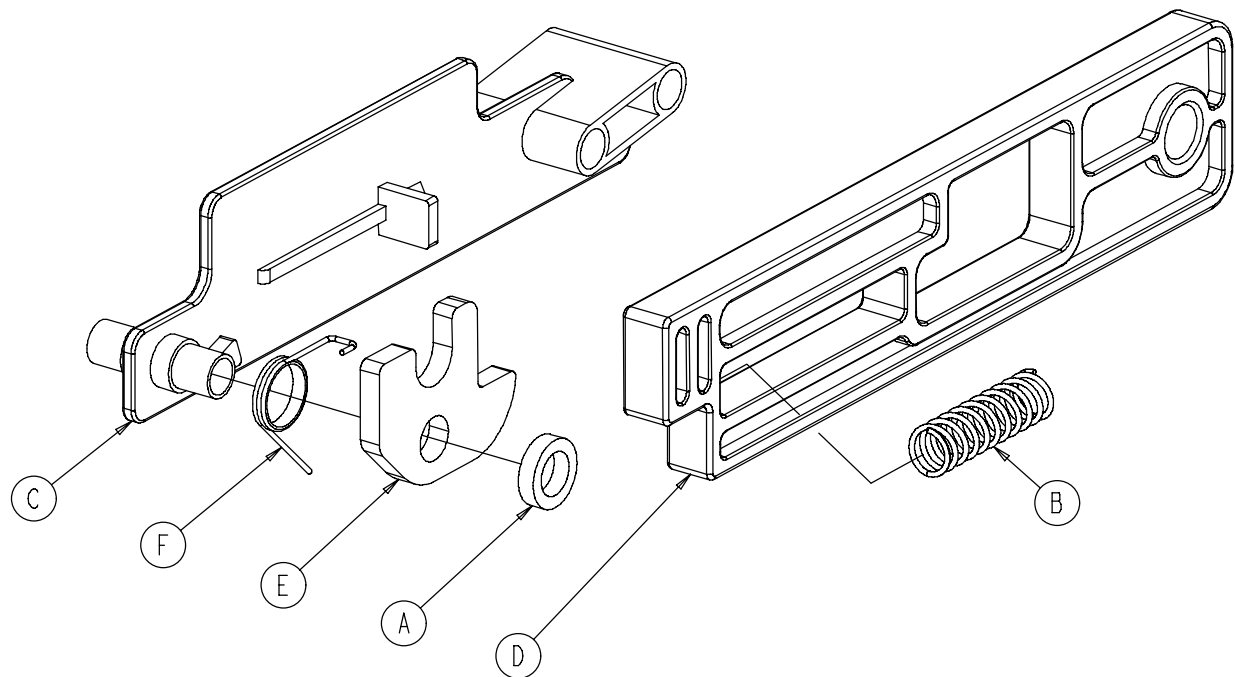

Élément	Numéro	Nom	Quantité
A	0014-098-000	Rondelle	1
B	0038-506-000	Ressort de compression	1
C	6252-001-097	Bloc de retenue du loquet	1
D	6252-001-098	Lame de déverrouillage du loquet	1
E	6252-001-099	Verrouillage du loquet du guide	1
F	6252-001-101	Ressort unique	1

# Mécanisme de verrouillage interne - 6252-001-015


Rév. B (référence uniquement)

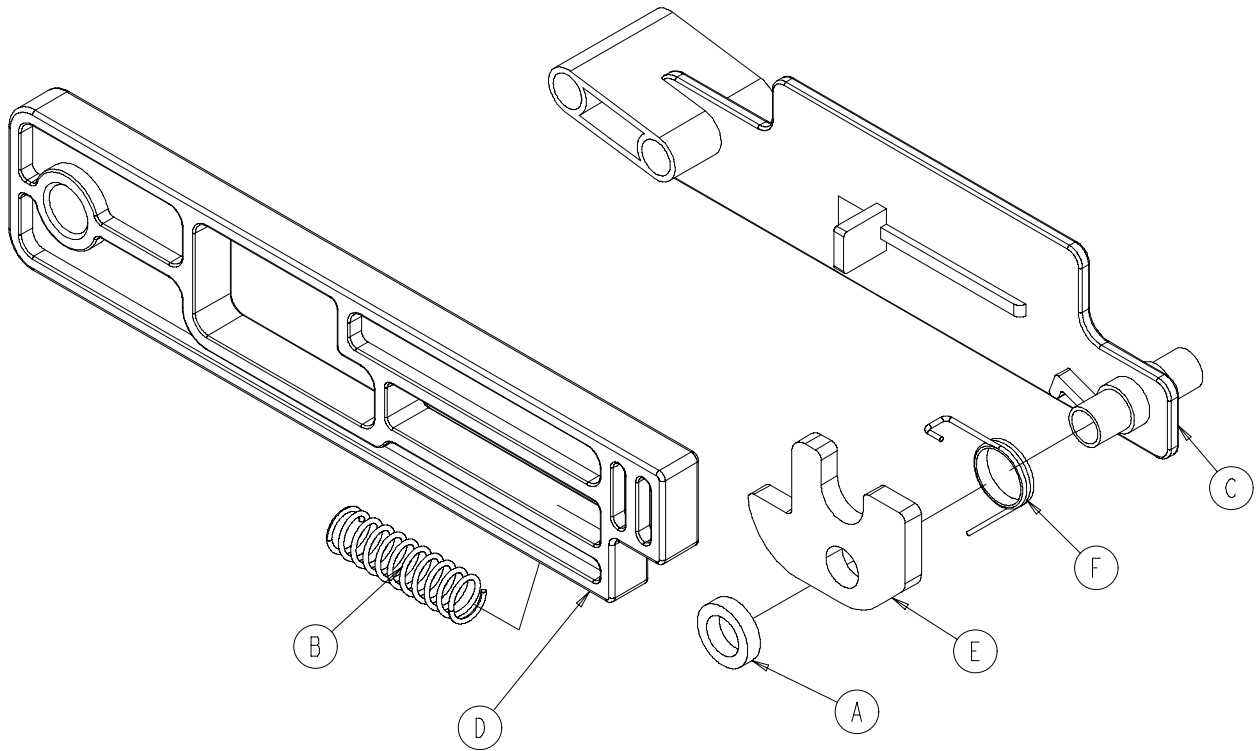

Élément	Numéro	Nom	Quantité
A	0014-098-000	Rondelle	1
B	0038-506-000	Ressort de compression	1
C	6252-001-097	Bloc de retenue du loquet	1
D	6252-001-098	Lame de déverrouillage du loquet	1
E	6252-001-099	Verrouillage du loquet du guide	1
F	6252-001-100	Ressort unique	1

# Ensemble de câble et broche


6252-001-016 rév. B (référence uniquement)

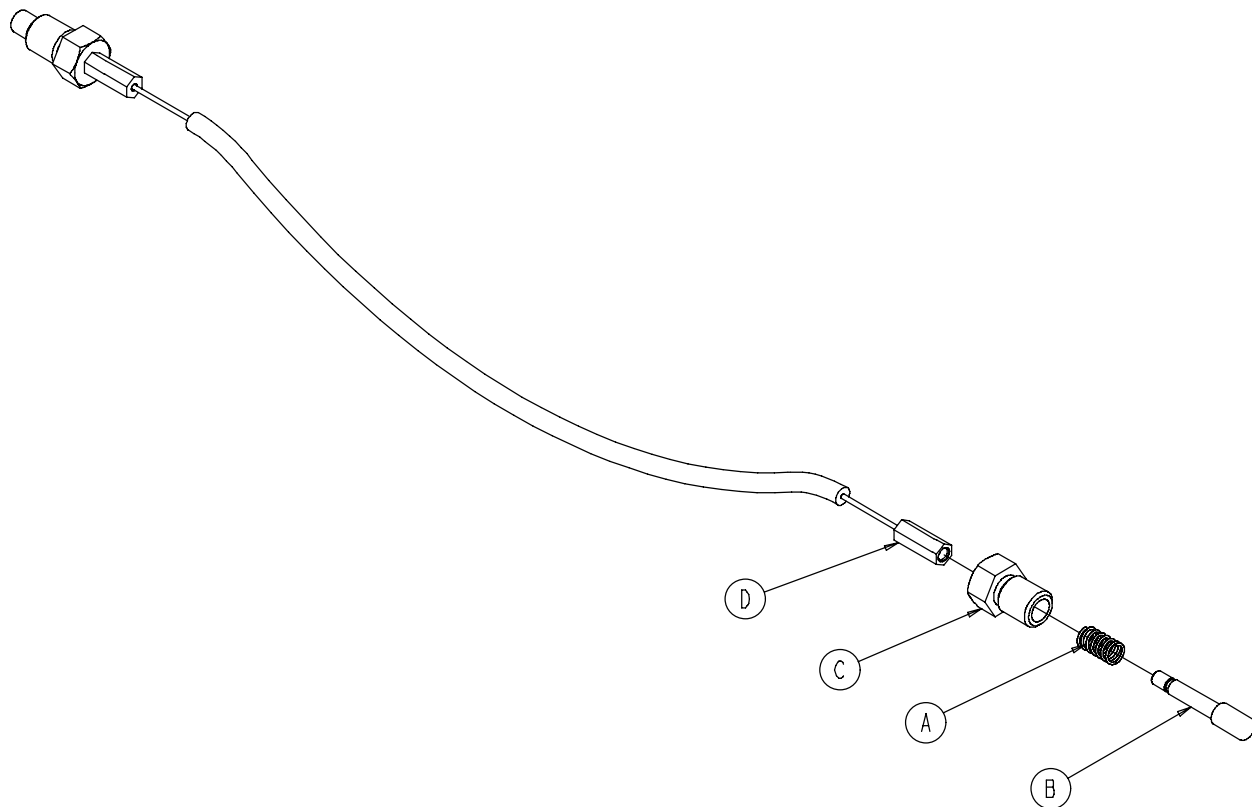

Élément	Numéro	Nom	Quantité
A	0038-507-000	Ressort de compression	2
B	6252-001-115	Broche de traction	2
C	6252-001-116	Boulon de la broche de traction	2
D	6252-001-119	Câble	1

# Poignée relevable verrouillable en option - 6250-031-000


Rév. E/6250-001-005 rév. AA (référence uniquement)

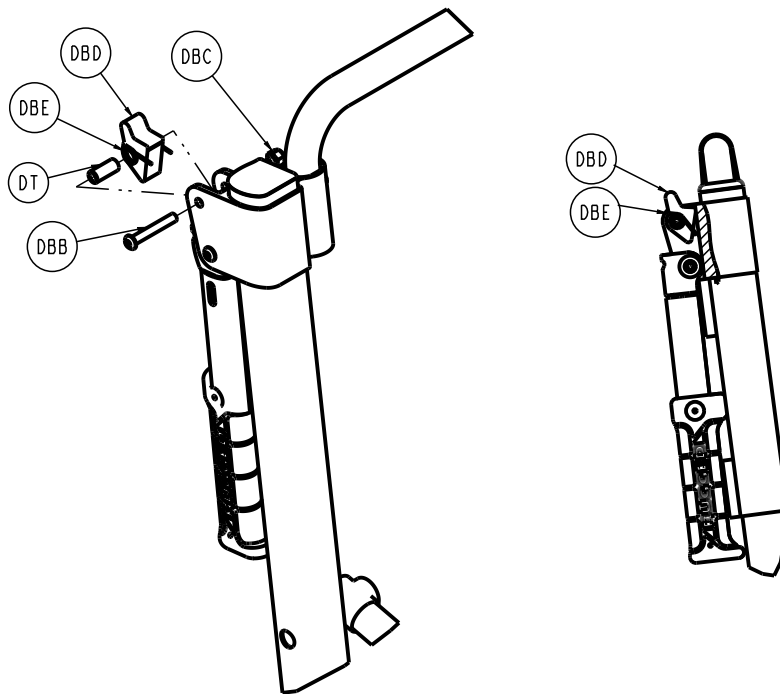

Élément	Numéro	Nom	Quantité
DT	6250-001-111	Entretoise pivotante de poignée relevable	2
DBB	0004-204-000	Vis d'assemblage à tête ronde	2
DBC	0016-028-000	Écrou Nylock	2
DBD	6250-001-113	Gâchette de la poignée relevable	2
DBE	6250-001-114	Ressort unique	2

# Ensemble de section pieds


6254-001-025 rév. AA (référence uniquement)

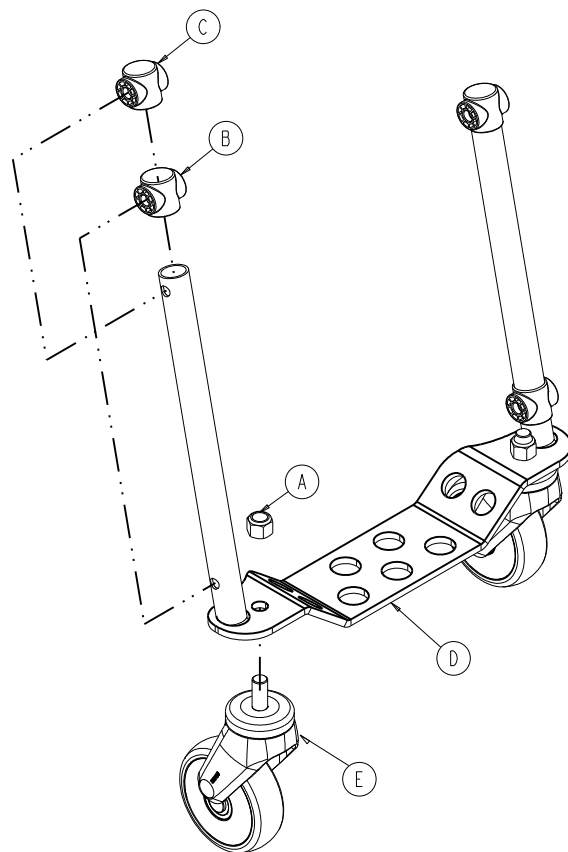

Élément	Numéro	Nom	Quantité
A	0016-064-000	Écrou hexagonal Nylock	2
B	6250-001-090	Capuchon d'extrémité de la section pieds	2
C	6250-001-096	Capuchon d'extrémité de la section pieds/siège	2
D	6254-001-050	Ensemble soudé de la section pieds	1
E	625100010083	Roulette	2

# Ensemble de poignée d'extension, droite

6254-001-014 rév. A (référence uniquement)

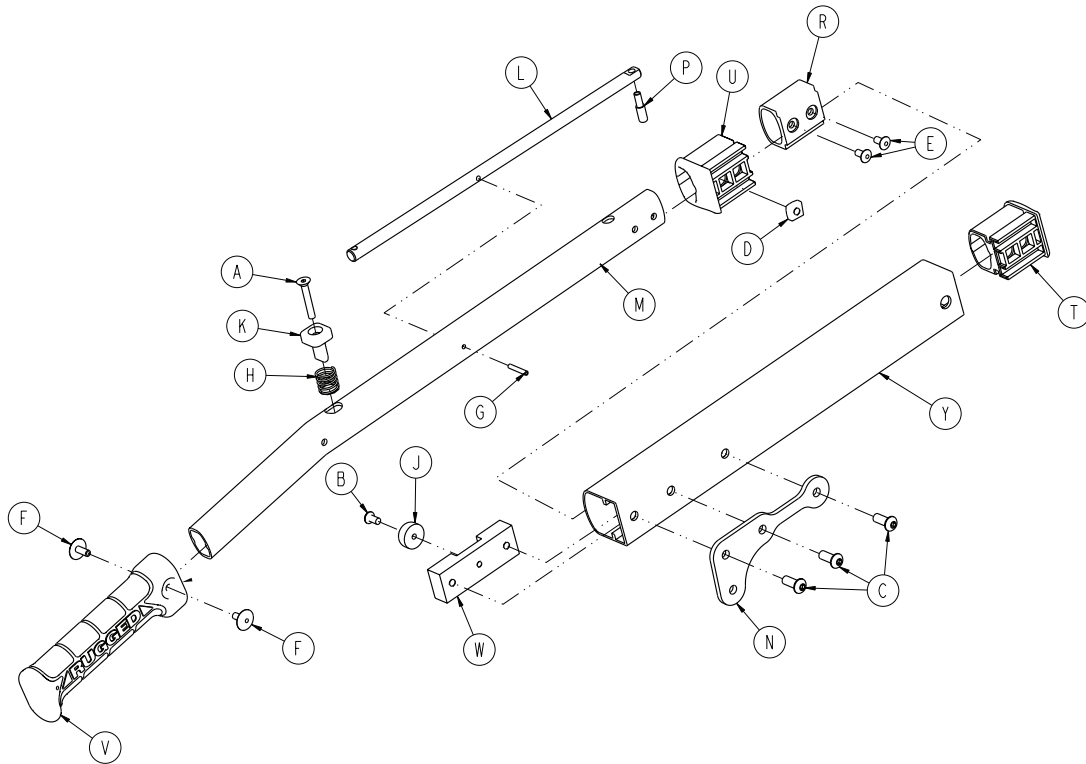


Élément	Numéro	Nom	Quantité
A	0001-138-000	Vis à empreinte à tête plate	1
B	0004-136-000	Vis d'assemblage à tête ronde	1
C	0004-509-000	Vis d'assemblage à tête ronde	3
D	0015-016-000	Écrou carré	1
E	0025-079-000	Rivet aveugle	2
F	0025-132-000	Rivet aveugle	2
G	0026-323-000	Broche à ressort spiralée	1
H	0038-462-000	Ressort de compression	1
J	0056-022-000	Pare-chocs	1
K	6100-031-065	Bouton-poussoir d'extension de poignée	1
L	6250-001-080	Levier de verrouillage du pivot de l'extension de la poignée	1
M	6250-001-081	Poignée d'extension interne	1
N	6254-001-082	Support pivotant de la poignée d'extension	1
P	6250-001-083	Broche de verrouillage de la poignée d'extension	1
R	6250-001-085	Douille coulissante interne	1
S	6250-001-086	Capuchon d'extrémité d'extrusion externe	1
T	6250-001-087	Douille pour poignée d'extension externe	1
U	6250-001-089	Poignée	1
V	6250-001-112	Butée fixe de la poignée d'extension	1

<b>Élément</b>	<b>Numéro</b>	<b>Nom</b>	<b>Quantité</b>
W	6254-001-121	Poignée d'extension externe, droite	1



# Ensemble de poignée d'extension, gauche


6254-001-015 rév. A (référence uniquement)

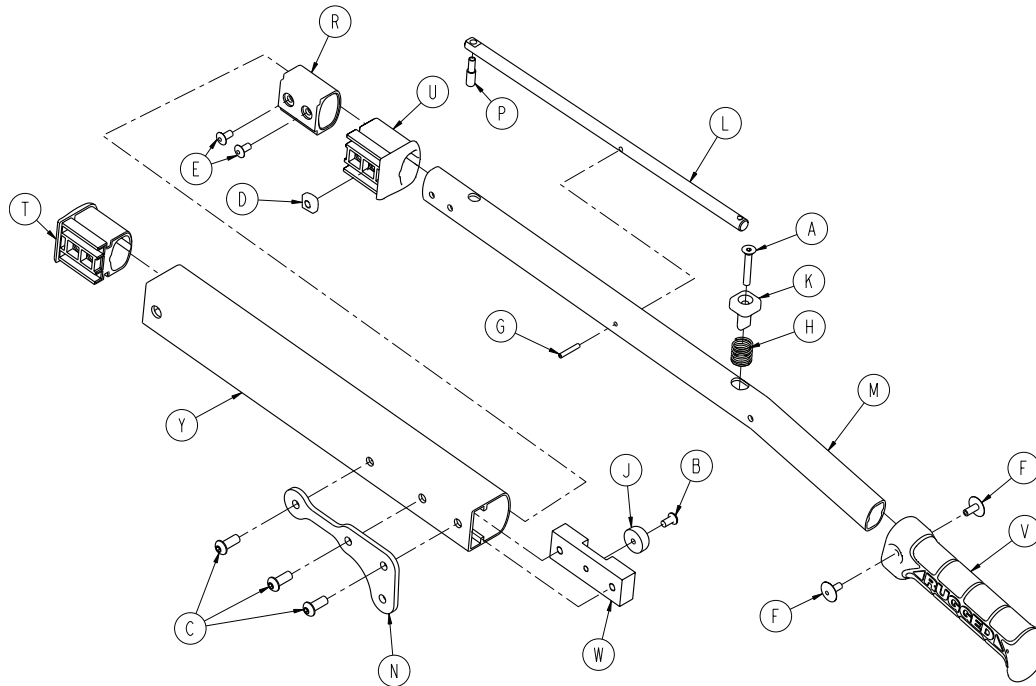

Élément	Numéro	Nom	Quantité
A	0001-138-000	Vis à empreinte à tête plate	1
B	0004-136-000	Vis d'assemblage à tête ronde	1
C	0004-509-000	Vis d'assemblage à tête ronde	3
D	0015-016-000	Écrou carré	1
E	0025-079-000	Rivet aveugle	2
F	0025-132-000	Rivet aveugle	2
G	0026-323-000	Broche à ressort spiralée	1
H	0038-462-000	Ressort de compression	1
J	0056-022-000	Pare-chocs	1
K	6100-031-065	Bouton-poussoir d'extension de poignée	1
L	6250-001-080	Levier de verrouillage du pivot de l'extension de la poignée	1
M	6250-001-081	Poignée d'extension interne	1
N	6254-001-082	Support pivotant de la poignée d'extension	1
P	6250-001-083	Broche de verrouillage de la poignée d'extension	1
R	6250-001-085	Douille coulissante interne	1
S	6250-001-086	Capuchon d'extrémité d'extrusion externe	1
T	6250-001-087	Douille pour poignée d'extension externe	1
U	6250-001-089	Poignée	1
V	6250-001-112	Butée fixe de la poignée d'extension	1
W	6254-001-122	Poignée d'extension externe, gauche	1

# Repose-pieds en option - 6254-029-000


Rév. A (référence uniquement)

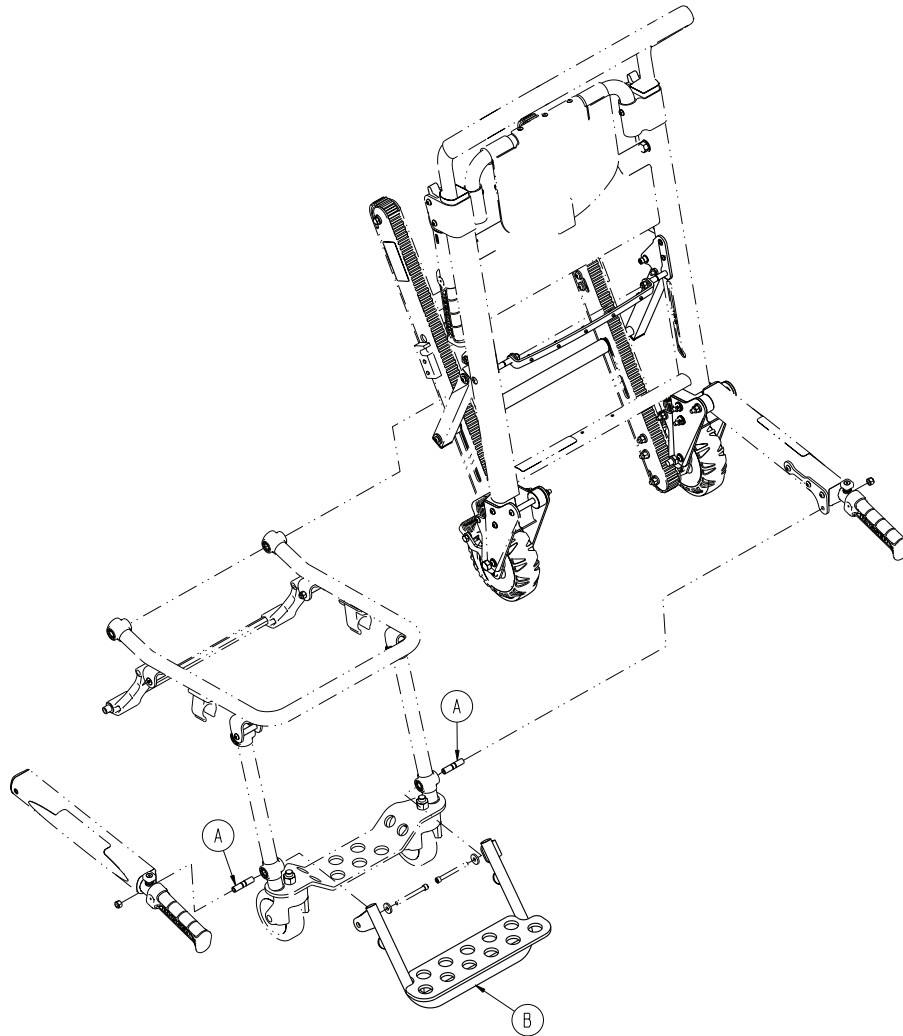

Élément	Numéro	Nom	Quantité
A	6250-003-098	Entretoise	2
B	6254-001-017	Ensemble de repose-pieds (page 34)	1

# Pas de repose-pieds en option - 6254-030-000


Rév. A (référence uniquement)

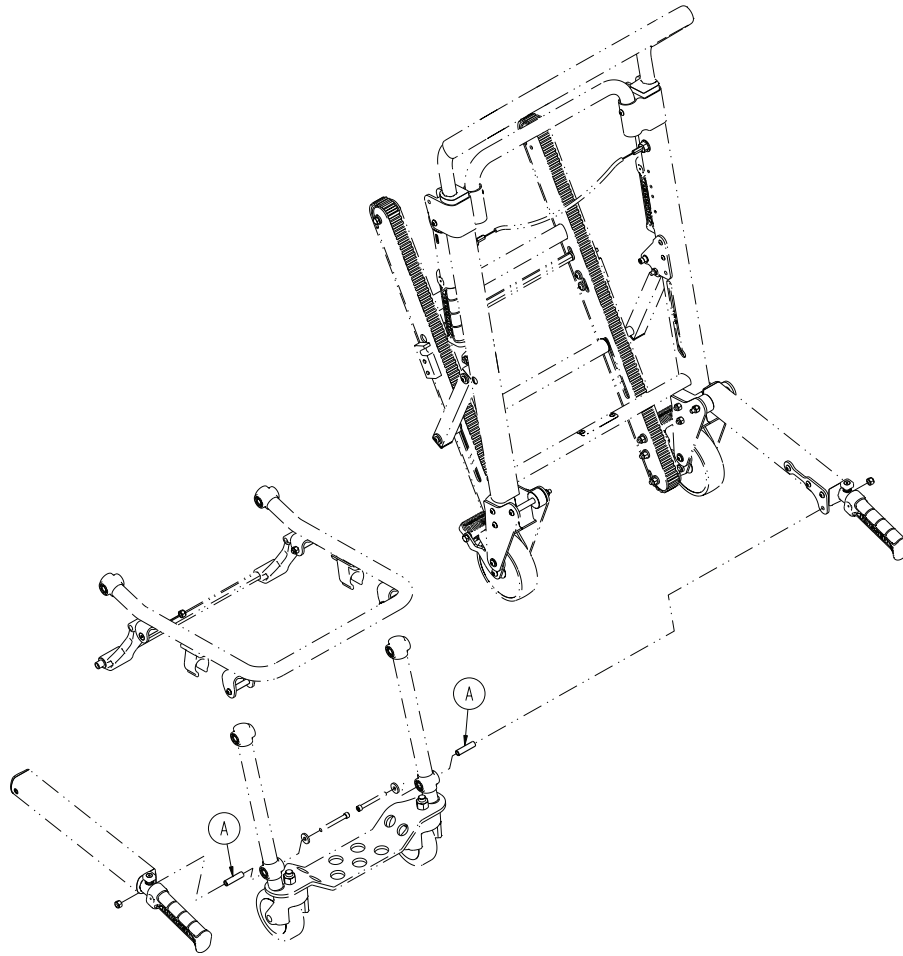

Élément	Numéro	Nom	Quantité
A	6250-001-098	Entretoise pivotante	2

# Ensemble de repose-pieds


6254-001-017 rév. A (référence uniquement)

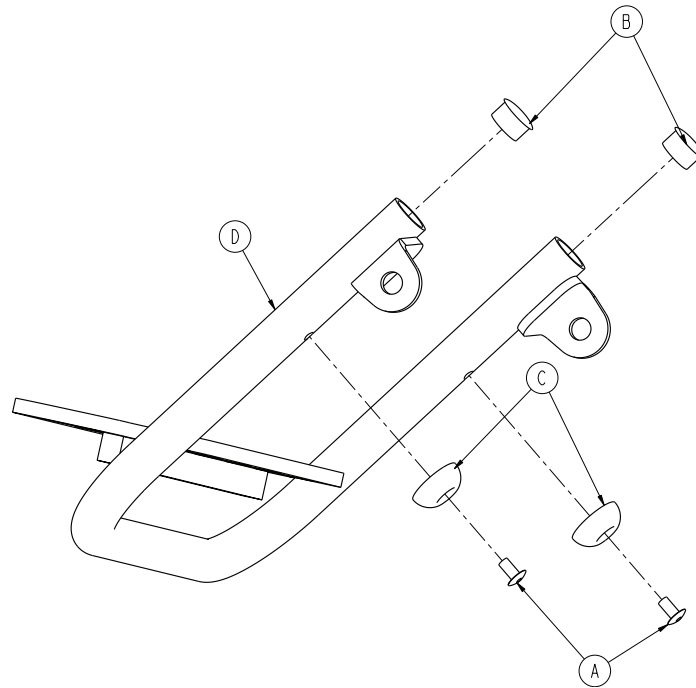

Élément	Numéro	Nom	Quantité
A	0025-079-000	Rivet de la tête du dôme	2
B	0037-202-000	Bouchon de tube	2
C	0946-001-155	Pare-chocs	2
D	6254-001-051	Ensemble soudé du repose-pieds	1

# Ensemble de section siège


6254-001-013 rév. A (référence uniquement)

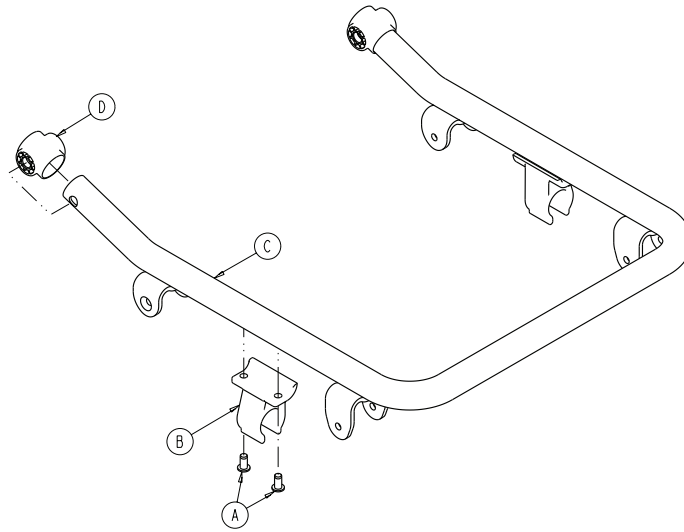

Élément	Numéro	Nom	Quantité
A	0025-120-000	Rivet	4
B	6080-110-035	Clip	2
C	6254-001-056	Châssis de siège	1
D	6250-001-096	Capuchon d'extrémité de la section pieds/siège	2

# Ensemble de poignée relevable


6250-001-016 rév. A (référence uniquement)

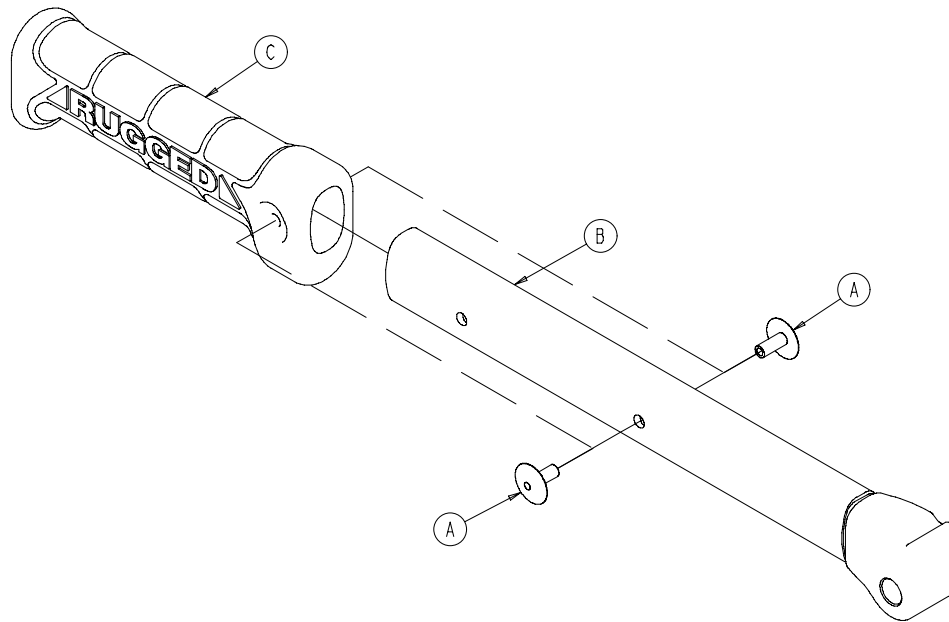

Élément	Numéro	Nom	Quantité
A	0025-132-000	Rivet aveugle	2
B	6250-001-052	Ensemble soudé de la poignée relevable	1
C	6250-001-089	Poignée	1

# Ensemble de mécanisme de verrouillage


6250-001-017 Rév. B (référence uniquement)

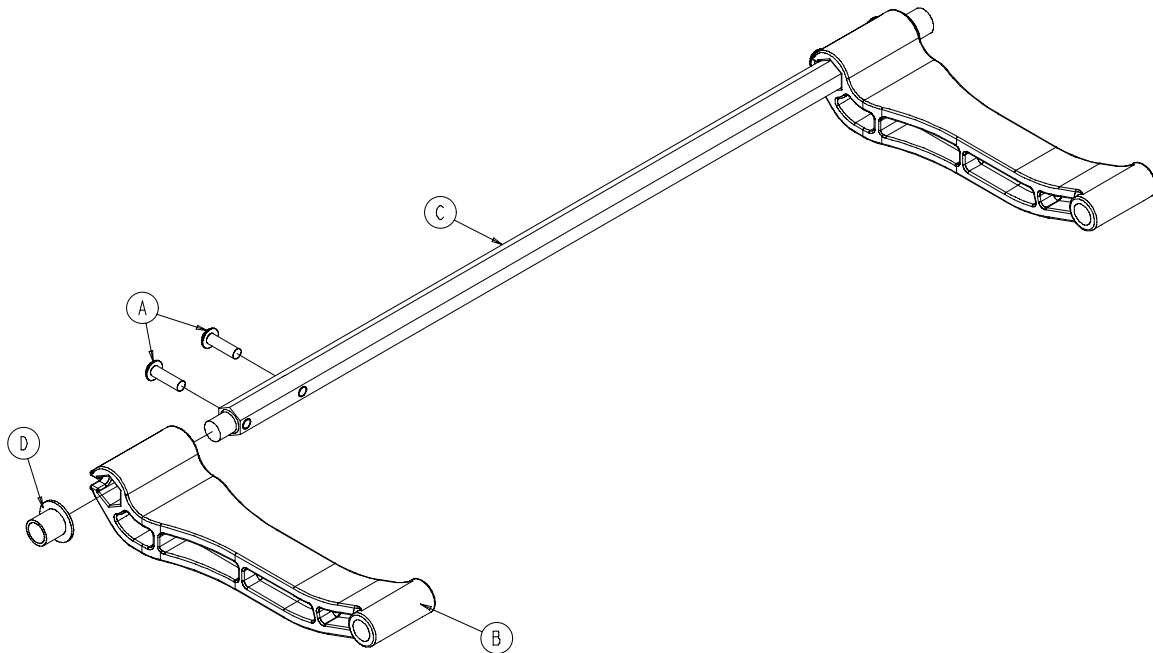

Élément	Numéro	Nom	Quantité
A	0004-515-000	Vis d'assemblage à tête ronde	4
B	6250-001-094	Mécanisme de verrouillage jambe de force	2
C	6250-001-095	Barre transversale	1
D	6250-001-124	Roulement de bride	2

# Support de bouteille d'oxygène élastique en option - 6250-140-000

Rév. A (référence uniquement)

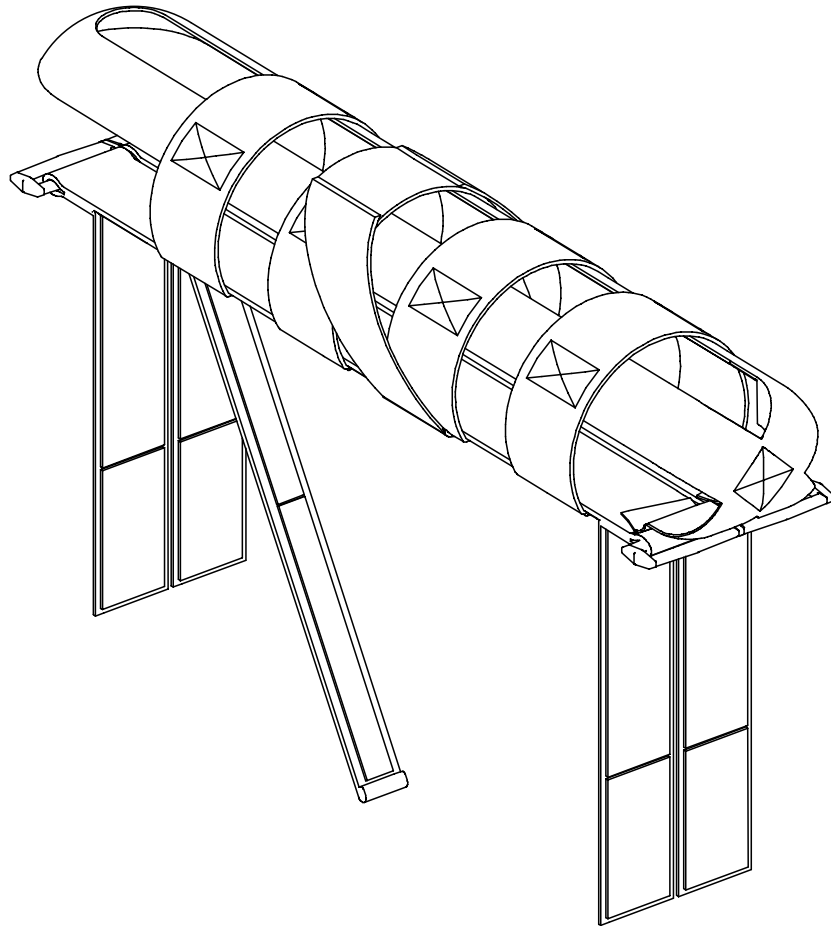

Élément	Numéro	Nom	Quantité
A	6250-140-080	Support de bouteille d'oxygène élastique	1







Stryker Corporation or its divisions or other corporate affiliated entities own, use or have applied for the following trademarks or service marks: **Stair-TREAD, Stryker**. All other trademarks are trademarks of their respective owners or holders.



Stryker Medical  
3800 E. Centre Avenue  
Portage, MI 49002  
USA