

Emergency Relief Bed™

stryker

Letto manuale da ospedale

Manuale d'uso

REF 7600-000-900



Simboli

| | |
|--|---|
| | Istruzioni per l'uso/Consultare le istruzioni per l'uso |
| | Avvertenza generale |
| | Tenere lontane le mani |
| | Vietato spingere |
| | Numero di listino |
| | Fabbricante |
| | Marcatura CE |
| | Mandatario per l'Unione Europea |
| | Carico operativo di sicurezza |
| | Peso dell'apparecchiatura con carico operativo di sicurezza |
| | Peso massimo del paziente |

| | |
|--|---|
| | Tenere all'asciutto |
| | Non usare oggetti affilati per aprire la confezione |

Riepilogo delle precauzioni di sicurezza

AVVERTENZA

La sicurezza personale del paziente o dell'utilizzatore può essere compromessa. Il mancato rispetto di queste informazioni potrebbe causare lesioni al paziente o all'utilizzatore.

ATTENZIONE

Queste istruzioni indicano speciali procedure o precauzioni da seguire per evitare danni all'apparecchiatura.

AVVERTENZA

- Non sedersi direttamente alle estremità del letto. Il peso eccessivo potrebbe causare il ribaltamento della superficie del lettino con conseguente rischio di lesioni al paziente.
- Innestare sempre i freni sulle ruote piroettanti mentre il paziente si distende o si alza dal letto. Spingere il letto per accertarsi che i freni siano saldamente bloccati. Inserire sempre i freni quando il letto non deve essere spostato. Se il letto si sposta mentre un paziente sta salendo o scendendo dal letto, il paziente potrebbe subire lesioni.
- Il limite massimo del peso del paziente per questo dispositivo è di 160 kg. Il carico operativo di sicurezza è di 180 kg. Un peso superiore a questo limite potrebbe causare la rottura o il cedimento del dispositivo con conseguenti lesioni al paziente.
- Per evitare lesioni all'utilizzatore finale, spingere il letto usando la maniglia della barra lato piedi quando il paziente è in posizione prona. È inoltre possibile spingere il letto dal lato testa quando è sollevato lo schienale (lato testa della superficie di supporto del paziente).
- Usare cautela quando si sposta il letto mentre è occupato perché non è dotato di cinghie di contenimento o sponde laterali.
- Non usare l'asta portaflebo come dispositivo di spinta o di trazione. Il prodotto potrebbe subire danni.

Descrizione del prodotto

Il **Emergency Relief Bed** è un letto da ospedale regolabile in modo manuale, senza ausili elettrici, che viene utilizzato in combinazione con una superficie di


CE

supporto del paziente e comprende un'asta portaflebo. La superficie di supporto del paziente, senza ausili elettrici, è adatta alle dimensioni del telaio. Questo letto e la superficie di base sono stati sviluppati in risposta alla carenza di letti ospedalieri durante la pandemia COVID-19.

Indicazioni per l'uso

Il **Emergency Relief Bed** serve come ausilio per il posizionamento, la terapia, il recupero, il sostegno e il trasporto di pazienti all'interno di un ospedale generale o in un ambiente di emergenza temporaneo in una situazione dichiarata a livello locale, regionale o statale. Il prodotto è previsto per l'uso soltanto per la durata della pandemia COVID-19. La superficie di supporto senza ausili elettrici è prevista per fornire una superficie di supporto per il trattamento e l'esame di un paziente.

Componenti del prodotto

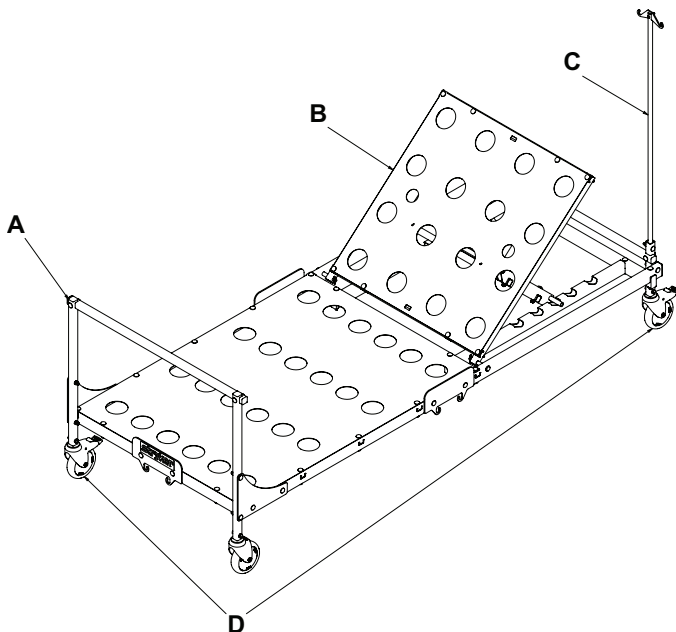

- A Maniglia della barra lato piedi
- B Schienale
- C Asta portaflebo
- D Ruota piroettante con freno

Installazione dell'asta portaflebo

1. Rimuovere la copiglia ad anello e la spina dal foro dell'asta portaflebo.

2. Inserire l'asta portaflebo (C) nell'apposito foro.
3. Reinstallare la copiglia ad anello e la spina per fissare l'asta portaflebo nell'apposito foro.

Pulizia

Metodo di pulizia consigliato:

1. Lavare a mano tutte le superfici esposte del prodotto applicando un detergente delicato a spruzzo o con salviette preimbevute.
2. Attenersi alle istruzioni del produttore della soluzione detergente per quanto riguarda i requisiti appropriati relativi al tempo di contatto e al risciacquo.
3. Asciugare il prodotto prima di rimetterlo in servizio.

Nota - Evitare una saturazione eccessiva. Non permettere che il prodotto resti bagnato.

Disinfezione

I disinfettanti consigliati per le superfici di questo prodotto includono:

- quaternari (principio attivo: cloruro d'ammonio) contenenti < 3% di glicol etere
- fenolici (principio attivo: o-fenilfenolo)
- Soluzione di candeggina (al 5,25% - meno di 1 parte di candeggina in 100 parti d'acqua)
- alcool (principio attivo: alcool isopropilico al 70%)

Metodo di disinfezione consigliato:

1. Per la diluizione della soluzione disinfettante utilizzata, attenersi ai consigli del produttore.
2. Applicare il disinfettante consigliato a spruzzo o con salviette preimbevute.
3. Lavare a mano tutte le superfici esposte del prodotto con il disinfettante consigliato.
4. Asciugare il prodotto prima di rimetterlo in servizio.

Nota

- Evitare una saturazione eccessiva. Non permettere che il prodotto resti bagnato.
- Attenersi ai consigli di diluizione del produttore per i requisiti appropriati relativi al tempo di contatto e al risciacquo. Attenersi alle linee guida del produttore del prodotto chimico per una corretta disinfezione.



Stryker Medical
3800 E. Centre Avenue
Portage, MI 49002
USA

EC REP

Stryker European Operations Limited
Anngrove, IDA Business & Technology Park
Carrigtwohill, Co Cork, T45 HX08
Ireland