

Lit manuel
MedSurg
Modèle FL23M

stryker®

Manuel d'entretien



Pièces et assistance technique :
USA : 1-800-327-0770 (option 2)
Canada : 1-888-233-6888

CE

Table des matières

Introduction	5
Utilisation	5
Illustration du produit	5
Renseignements techniques	6
Attention / avertissement / remarque	6
Symboles	7
Procédures d'installation	8
Instructions de lubrification	8
Liste des vérifications à effectuer annuellement	8
Programme d'entretien préventif	10
Vérifications annuelles	10
Nettoyage	11
Nettoyage du lit	11
Entretien des matelas	11
Pièces de rechange à conserver	12
Procédures d'entretien	13
Procédure de remplacement - Côté de lit - Barrière	13
Procédure de remplacement - Côté de lit - Ensemble d'un côté de lit	15
Procédure de remplacement - Côté de lit - Plaque de transfert	16
Procédure de remplacement - Sommier	17
Procédure de remplacement - Sommier - Section de pied	18
Procédure de remplacement - Sommier - Section de cuisse	19
Procédure de remplacement - sommier - section de siège	20
Procédure de remplacement - sommier - Section de tête	21
Procédure de remplacement - Manivelle	23
Procédure de remplacement - Vérin de la section de tête	24
Procédure de remplacement - Vérin de la section de cuisse	26
Lubrification de la vis des vérins de la section de tête et de la section de cuisse	28
Mécanisme d'élévation du lit - Remplacement de l'écrou moulé et/ou de la vis de pied	29
Base - Pédale de frein/direction	31
Base - Roulette de la 5 ^e roue (en option)	32
Base - Ensemble de la 5 ^e roue (en option)	32
Base - Ensemble du bras plongeant de la 5 ^e roue (en option)	33
Roulette du lit	34
Barre de liaison du mécanisme de freinage	35
Dessins d'assemblage	
Ensemble de poteaux - L23-005	36
Base - L23-006G	37
Mécanisme d'élévation - L23-009	39
Châssis - L23-010	43
Sommiers - L23-016	45
Levage tête et pied - L23-017	47
Mécanisme de freinage sans 5 ^e roue - OL230042	50

Table des matières

Dessins d'assemblage (Suite)	
Mécanisme de freinage avec 5 ^e roue - OL230043	52
Roulettes 6" sans 5 ^e roue - OL230048	54
Roulettes 6" avec 5 ^e roue - OL230050	56
Pare-chocs - une roulette rigide - OL230052	58
Pare-chocs - deux roulettes souples - OL230053	60
Pare-chocs réglables - OL230054	62
Couvercles de roue - OL230101	63
Manivelles fixes - OL230161	65
Manivelle amovible - OL230162	67
Lit sur pattes 6" - OL230163	69
Autocollants FL23M - anglais seulement - OL230164	70
Vis de blocage de panneau - OL230165	72
Autocollants FL23M - anglais/espagnol - OL230184	73
Autocollants FL23M - français/anglais - OL230185	75
Protecteur PVC pour côté pleine longueur - OL230208	78
Côté de lit pleine longueur rétractable sans contrôle - OL230211	79
Couvercle de pied demi-longueur - OL230212	83
Couvercle de pied demi-longueur - OL230213	84
5 ^e roue - OL230219	85
Protecteur PVC - Côté de lit rétractable - OL230226	88
Manivelle pour option manivelles amovibles - OL230228	89
Côtés de lit mi-longueur rétractables - OL230237	90
Panneau mélamine sans module de commande - OP230194	93
Panneau MDF stratifié sans module de commande - OP230195	94
Panneaux massifs sans module de commande - OP230214	95
Garantie	96
Garantie limitée	96
Pièces et service	96
Couverture des contrats de service	96
Programmes de contrats de service	97
Autorisation de retour	97
Marchandise endommagée	97
Clause de garantie internationale	97


Introduction

UTILISATION

Ce manuel est conçu pour vous aider dans l'entretien du lit de soins médicaux manuel MedSurg, modèle FL23M. Lisez-le attentivement avant de commencer toute opération d'entretien. Ce guide doit être à la disposition du personnel d'entretien en tout temps.

Le manuel d'entretien fait partie intégrante du lit et doit être remis à son nouveau propriétaire dans le cas d'un transfert ou d'une vente.


ILLUSTRATION DU PRODUIT

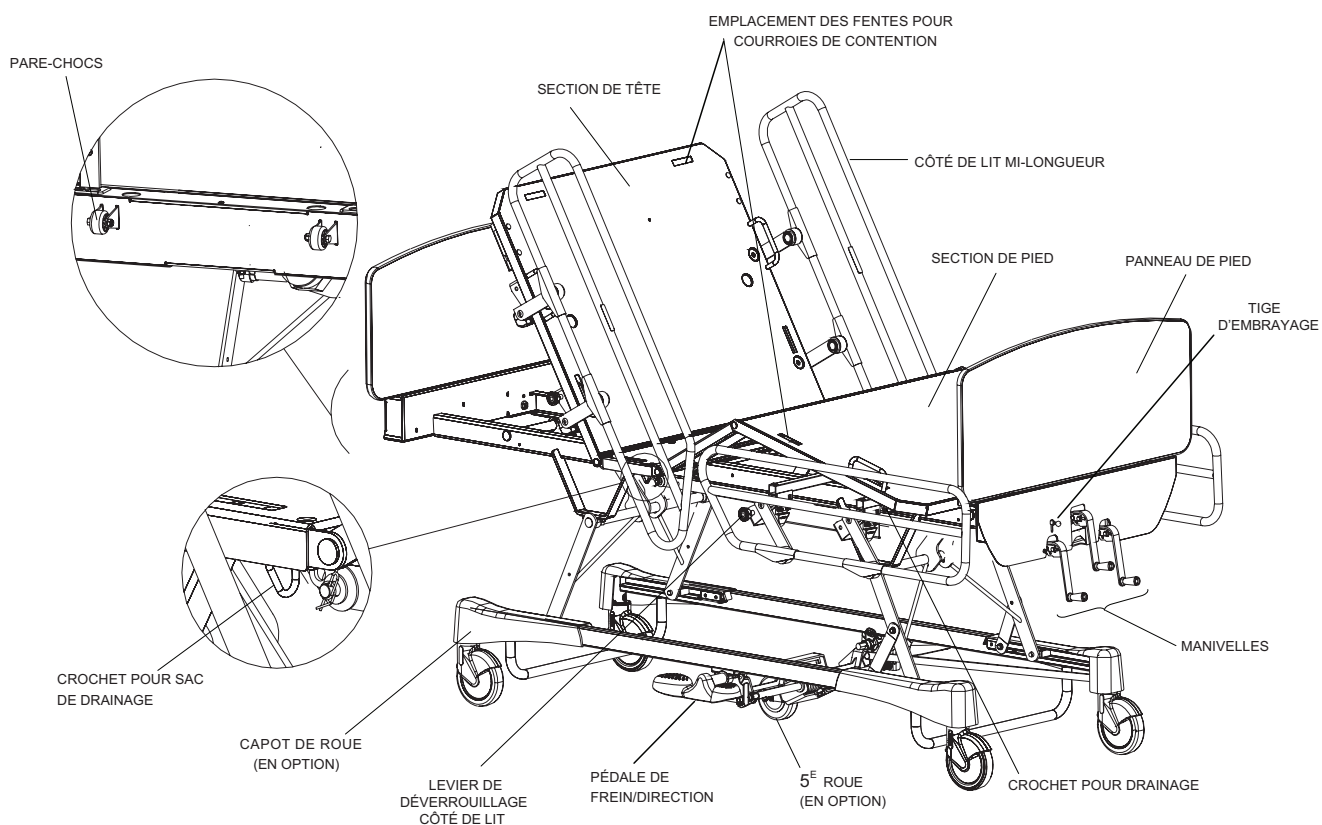

[Retour à la table des matières](#)

Introduction

RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES

	Charge maximale de sécurité*		
	Remarque : La charge maximale de sécurité est la somme du poids du patient, du matelas et des accessoires.	500 lbs	227 kg
Longueur/largeur hors-tout	Côtés de lit mi-longueur relevés Côtés de lit pleine longueur relevés	90.4" x 41.3" 90.4" x 39.9"	2296 x 1049 mm 2296 x 1013 mm
Poids avec panneaux		390 lbs	177 kg
Sommier		35 x 78"	89 x 198 cm
Dimension du matelas recommandé	Longueur/largeur	35 x 78" ou 80"	89 x 198 cm ou 203 cm
	Épaisseur maximale	6"	15.24 cm
Élévation minimum/maximum du lit		15" à 29"	38.1 à 73.66 cm
Angle de la section de tête		0° à 62°	
Angle de la section de cuisse		0° à 32°	
<i>Trendelenburg Reverse Trendelenburg</i>		+14° à -14°	

Stryker se réserve le droit de modifier les renseignements techniques sans préavis.

Les renseignements techniques énumérés ci-dessus sont approximatifs et peuvent varier d'un lit à l'autre.

ATTENTION / AVERTISSEMENT / REMARQUE

Les mots **ATTENTION**, **AVERTISSEMENT** et **REMARQUE** ont une signification particulière que vous devez observer minutieusement.

ATTENTION

Concerne la sécurité personnelle du patient ou de l'utilisateur. Le non-respect de cette information peut provoquer des risques de blessures au patient ou à l'utilisateur.

AVERTISSEMENT

Alerte le lecteur d'une situation qui pourrait être dangereuse et qui, si non évitée, pourrait causer des blessures mineures ou modérées au patient ou à l'utilisateur ainsi que des dommages à l'équipement ou à toute autre propriété. L'avertissement contient aussi les soins nécessaires pour l'utilisation efficace et sécuritaire du produit et les méthodes particulières afin d'éviter d'endommager le produit suite à son utilisation selon les normes ou non.

Remarque

Contient de l'information particulière pour faciliter l'utilisation, l'entretien ou préciser des recommandations importantes.

Symboles



Attention, consulter la documentation d'accompagnement



Symbole de charge maximale de sécurité

Procédures d'installation

INSTRUCTIONS DE LUBRIFICATION

Vous trouverez ci-dessous la liste des points du lit à lubrifier. La lubrification doit se faire sur une base annuelle.

ATTENTION

L'utilisation de graisses autres que celle recommandée (OG 2) risque d'entraîner une détérioration des composants critiques du lit ainsi que des bris de mécanisme susceptibles de causer des blessures à l'utilisateur et/ou au patient et des dommages au lit.

AVERTISSEMENT

Ce lit utilise des entretoises à épaulement autolubrifiantes aux points d'articulation. Ne lubrifiez pas ces entretoises. Si elles sont usées, remplacez-les.

LISTE DES VÉRIFICATIONS À EFFECTUER ANNUELLEMENT

___ Mécanisme d'élévation du lit (Figure 2.2A, page 9)

- Lubrifiez les filets des deux vis du mécanisme d'élévation. Ne lubrifiez que la partie parcourue par l'écrou. Actionnez le mécanisme d'élévation plusieurs fois pour répartir la graisse.
- Lubrifiez le chemin parcouru par la fourchette du mécanisme d'embrayage sur la boîte de couplage.

___ Vérins de tête et de cuisse (Figure 2.2B, page 9)

- Lubrifiez la vis des deux vérins. Référez-vous à la page 28 pour la procédure de lubrification de ces vis.

___ Manivelles (Figure 2.2C, page 9)

- Nettoyez et graissez au besoin l'articulation servant de pivot escamotable.

Numéro de série du lit :		

Complété par : _____

Date : _____

Procédures d'installation

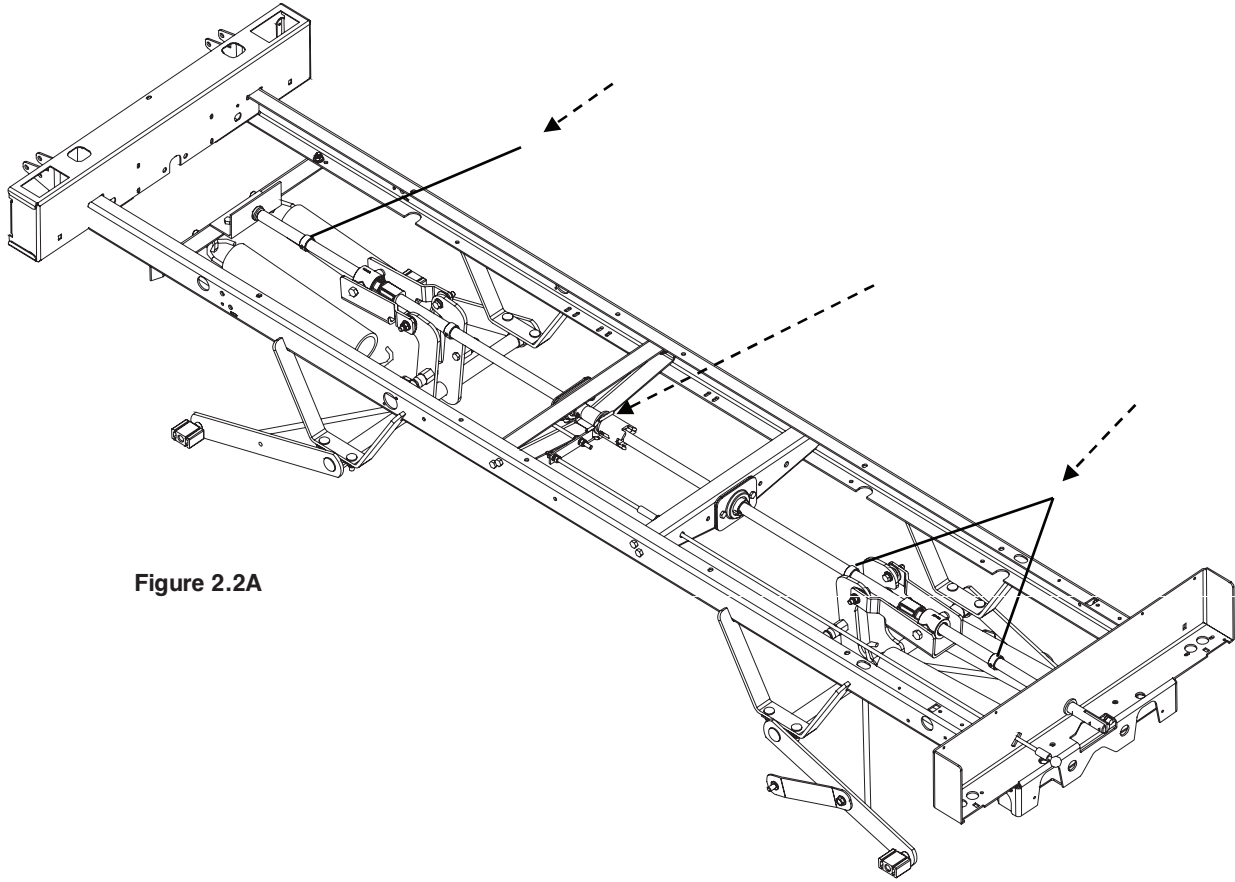


Figure 2.2A

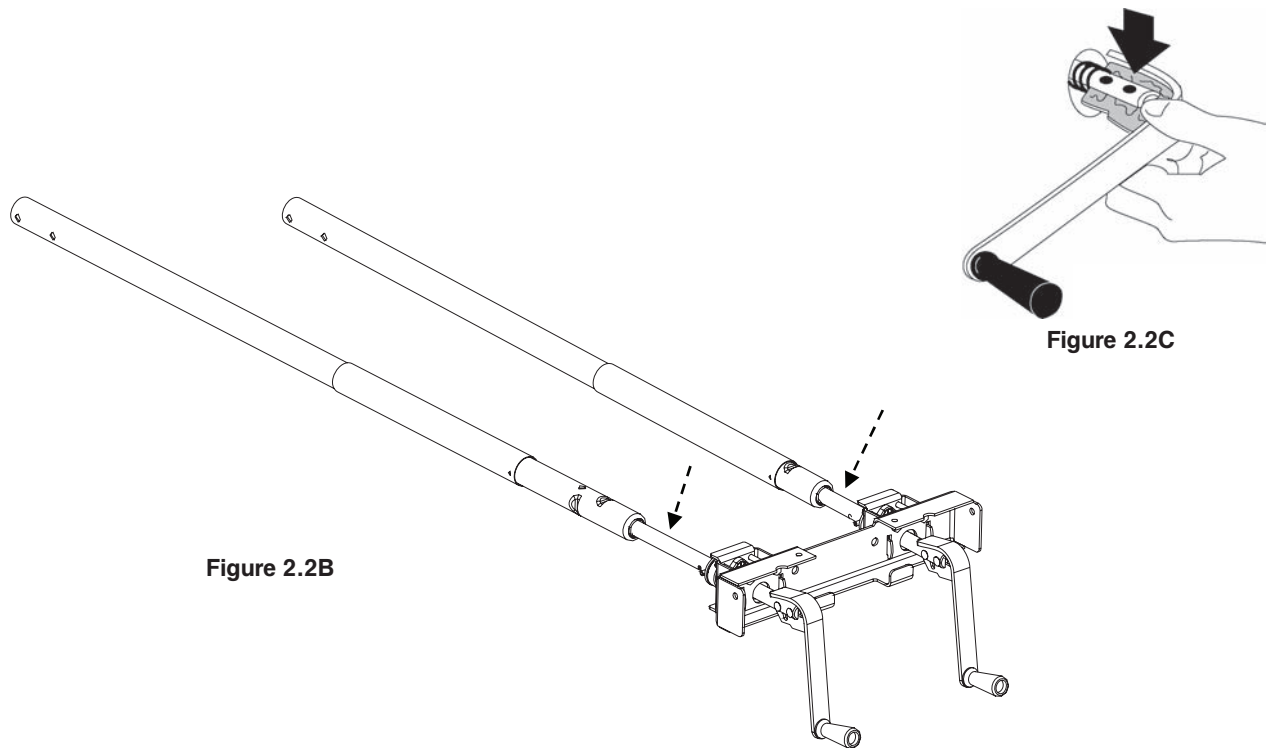


Figure 2.2C

Figure 2.2B

Programme d'entretien préventif

ATTENTION

N'utilisez que des pièces de remplacement identiques fournies par Stryker.

VÉRIFICATIONS ANNUELLES

- _____ Tous les articles de fixation sont bien serrés.
- _____ Vérifiez l'usure des entretoises à épaulement utilisées aux points d'articulation du lit. **Ne les lubrifiez pas**, remplacez-les au besoin.
- _____ Vérifiez le mécanisme complet de chaque côté de lit; assurez-vous que toutes les pièces mobiles et fixes sont bien boulonnées. Un côté qui ne se manoeuvre qu'avec difficulté, qui ne se verrouille pas en position haute ou se verrouille avec difficulté est souvent le résultat d'un boulonnage déficient. Resserrez les boulons et écrous.
- _____ Vérifiez ensuite l'opération de chaque côté de lit : le pivotement du côté doit se faire sans résistance et le verrouillage en position haute doit être immédiat; en position verrouillée, le côté doit être totalement immobilisé et offrir une prise ferme; le côté doit s'abaisser uniquement en ayant recours au levier de déverrouillage.
- _____ Enfoncez, de chaque côté du lit, le côté de la pédale identifié par l'étiquette rouge et assurez-vous que les freins sont appliqués et le lit bien immobilisé. Ramenez la pédale au neutre et assurez-vous que les freins sont relâchés.
- _____ Enfoncez, de chaque côté du lit, le côté de la pédale identifié par l'étiquette verte et assurez-vous que le mode directionnel - roulette directionnelle du lit ou 5^e roue (en option) - est activé. Ramenez la pédale au neutre et assurez-vous que le mode directionnel est désactivé.
- _____ Vérifiez les positionnements *Trendelenburg*. Reportez-vous à la section "Positionnement *Trendelenburg*" du guide de l'utilisateur pour activer ces positions.
- _____ La tige de soutien de la section de pied fonctionne correctement.
- _____ Aucune fissure dans les panneaux du lit.
- _____ Les pare-chocs situés à la tête du lit sont solidement fixés et fonctionnent correctement.
- _____ Les housses de matelas ne comportent aucune déchirure, ni trou; remplacez le cas échéant.
- _____ Les roulettes fonctionnent correctement. Vérifiez l'usure ou la présence de coupure sur la surface de roulement. Enlevez la saleté accumulée.
- _____ Vérifiez et lubrifiez au besoin les points de lubrification énumérés et illustrés à la section "Instructions de lubrification", [page 8](#).

Remarque

Il peut être nécessaire de procéder plus fréquemment à cet entretien préventif si le lit est utilisé de façon intensive.

Numéro de série du lit :		

Complété par : _____

Date : _____

Nettoyage

NETTOYAGE DU LIT

AVERTISSEMENT

N'utilisez pas de solvant ni de détergent fort ou abrasif. Ne lavez pas le lit à la vapeur, ni au jet d'eau, ni par ultrasons. Ne submergez pas les composants du lit dans l'eau.

Ne sont pas considérés comme des détergents doux, les désinfectants germicides quaternaires, utilisés comme indiqué, et/ou les produits chlorés. Ces produits sont de nature corrosive et peuvent endommager votre lit s'ils ne sont pas utilisés adéquatement. Lorsqu'ils sont utilisés, assurez-vous que les lits sont nettoyés ensuite à l'eau propre et bien séchés. Négliger de bien rincer et sécher les lits entraînera l'accumulation de résidu corrosif sur la surface du lit susceptible de causer une corrosion prématurée des composants critiques du lit. Le non-respect de ces recommandations lorsque ces produits sont utilisés peut entraîner la remise en cause de la garantie du produit.

Nettoyage du lit

Lavez à la main toutes les surfaces du lit avec un linge de ratine et un détergent doux en solution dans de l'eau tiède. Essuyez et séchez bien les surfaces nettoyées afin d'éliminer les résidus de détergent.

ENTRETIEN DES MATELAS

ATTENTION

Inspectez le matelas après chaque utilisation. Retirez le matelas du service si la housse présente des signes de fendillement ou de déchirure permettant aux liquides de s'infiltrer jusqu'au matelas. Négliger de nettoyer correctement les matelas ou de retirer du service les matelas défectueux accroît le risque d'exposition aux substances pathogènes susceptibles de causer des infections chez le patient ou l'utilisateur.

Inspection

- Mettez en application des politiques locales visant le soin, l'entretien et le nettoyage réguliers des matelas et des housses. On peut prendre connaissance de la procédure de nettoyage des housses ci-dessous ainsi que sur la housse du matelas.
- Inspectez régulièrement la surface interne et externe des housses ainsi que les fermetures éclair pour tout signe de détérioration. Si la housse est irrémédiablement tachée ou souillée, ou déchirée, retirez le matelas du service.

Nettoyage

Taches : lavez à l'eau tiède avec un savon doux. Rincez à l'eau et séchez. Pour les taches rebelles, utilisez une solution d'eau de javel diluée dans dix parties d'eau.

Pièces de rechange à conserver

Remarque

Les pièces et accessoires énumérés sur cette page sont tous disponibles pour vente. Certaines pièces identifiées dans les pièces de dessin d'assemblage de ce manuel ne sont pas disponibles individuellement pour achat. Veuillez contacter le service à la clientèle de Stryker aux États-Unis : 1 800 327-0770 (Option 2) ou au Canada: 1 888 233-6888 pour la disponibilité.

Description	Numéro de pièce	Liste
Composants des côtés de lit		
Plaque de transfert droite	23-0439G	OL230207G/CG
Plaque de transfert gauche	23-0425G	OL230207G/CG
Protecteur PVC - côté de pied	23-0478	OL230205
Protecteur PVC - côté de tête	23-0617	OL230205
Composants du sommier		
Arrêt de matelas	QP14034-07	L23-011G
Bloc porte-tige	QP17-0121-07	L23-010G
Roulettes		
6" avec mécanisme de blocage	RD25038807	OL230048 / OL230050
6" sans mécanisme de blocage	RD25049307	OL230048 / OL230050
6" avec mécanisme directionnel	RD25049607	OL230048 / OL230050
Roulette 5" du mécanisme de la 5 ^e roue (en option)	RL5	OL230113G
Composants de la base		
Goupille d'attache diamètre 3/8"	QDF7878	OL230042G / OL230043G
Autocollant vert - 5 ^e roue	QE71-0496	OL230042G / OL230043G
Autocollant rouge - frein	QE71-0511	OL230042G / OL230043G
Couvercle de roue droit (en option)	QP25-0022-07	OL230101
Couvercle de roue gauche (en option)	QP25-0039-07	OL230101
Velcro d'attache du capot de roulette (en option)	25-0550	OL230101
Pédale de frein/direction	QP21-3761-11	OL230042G / OL230043G
Divers		
Contenant de peinture de retouche gris	DDCAP-GSP	
Entretoise à épaulement	QDF17-0020	
Attache de câble en nylon	QDF9518	

Procédures d'entretien

ATTENTION

Afin d'éviter des blessures lorsque vous travaillez sous le lit en position haute, placez toujours des blocs sous les leviers d'élévation du lit et appliquez les freins.

L'entretien de ce lit ne devrait être confié qu'à du personnel d'entretien qualifié, à défaut de quoi il pourrait en résulter des dommages au lit ou des blessures sérieuses au patient et/ou à l'utilisateur.

Note

Les termes "droit" et "gauche" utilisés dans ce manuel réfèrent aux côtés droit et gauche d'un patient allongé sur le dos dans le lit.

PROCÉDURE DE REMPLACEMENT - CÔTÉ DE LIT - BARRIÈRE

Outils nécessaires :

- Petit tournevis à lame plate
- Pincés à long bec
- Maillet en caoutchouc
- Clé à cliquet et douille 7/16"

Procédure :

1. Montez complètement le lit et appliquez les freins.
2. Placez toutes les sections du sommier en position horizontale.
3. Débranchez le cordon d'alimentation du lit de la prise murale.
4. Relevez le côté de lit à réparer.
5. À l'aide du petit tournevis à lame plate et des pincés à long bec, retirez les deux bouchons de protection (A). Manipulez les outils avec soin pour éviter d'abîmer la peinture du côté de lit.

Remarque

Remplacez les bouchons à l'aide du maillet en caoutchouc. Le retrait des bouchons de protection risque de les endommager. Assurez-vous d'en avoir sous la main.

6. a. Pour un côté de tête, à l'aide d'une douille 7/16" retirez l'écrou, la rondelle ressort et l'espaceur maintenant le côté de lit en place.
b. Pour un côté de pied, retirez à l'aide d'une douille 7/16" l'écrou, la rondelle ressort et l'espaceur maintenant le côté de lit en place (B).

Remarque

Vérifiez l'usure des coussinets autolubrifiants et remplacez-les au besoin.

7. Inversez les étapes précédentes pour installer la nouvelle barrière.
8. Vérifiez le mouvement de la barrière avant de remettre le lit en service.

Procédures d'entretien

PROCÉDURE DE REMPLACEMENT - CÔTÉ DE LIT - BARRIÈRE (SUITE)

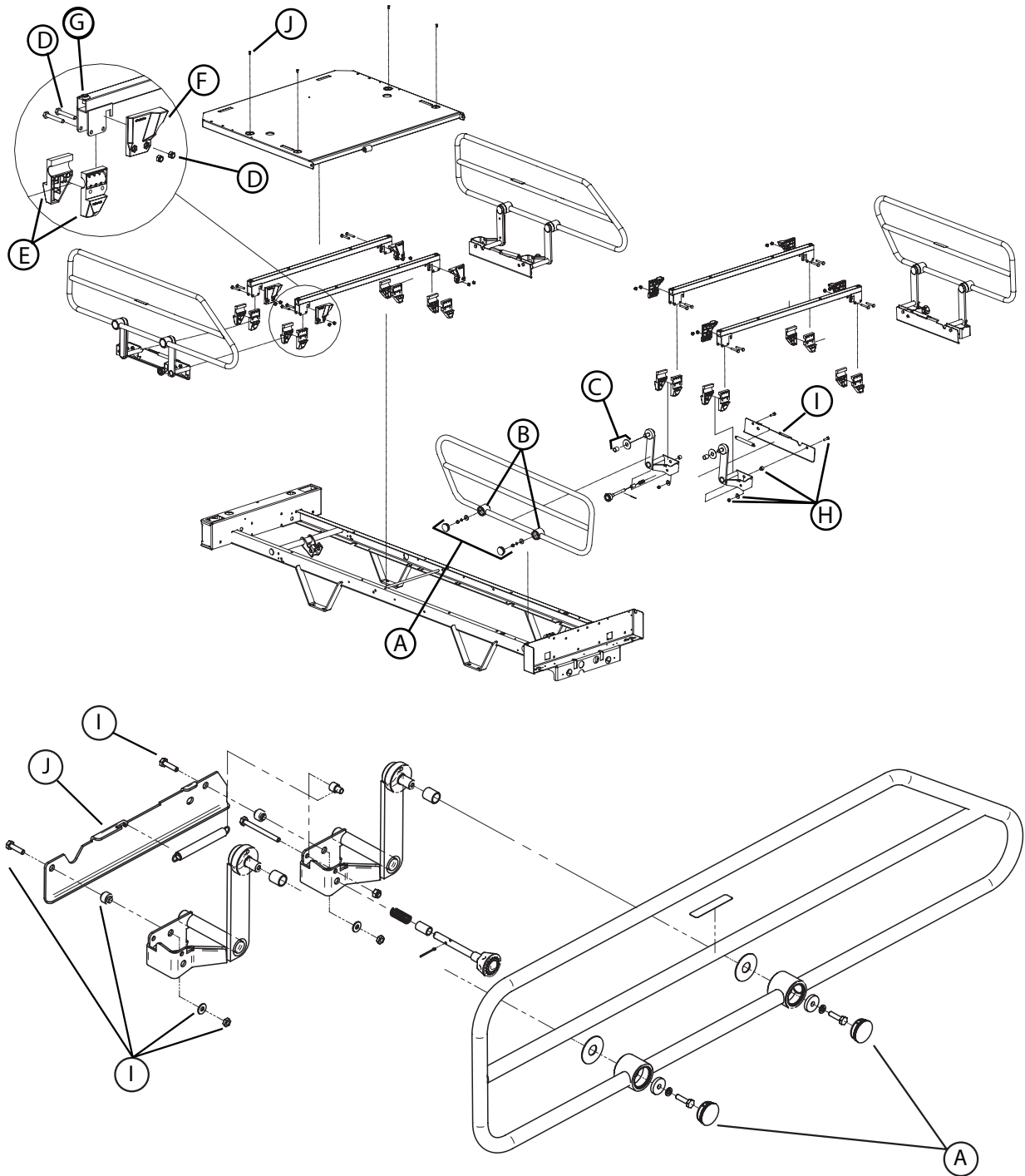


Figure 3.1A

Procédures d'entretien

PROCÉDURE DE REMPLACEMENT - CÔTÉ DE LIT - ENSEMBLE D'UN CÔTÉ DE LIT

Outils nécessaires :

- Clé à cliquet et douille 7/16"
- Clé 7/16"
- Pince coupante

Procédure :

Remarque

À moins d'indications contraires, référez-vous à la figure 3.1A, [page 14](#) pour l'illustration des références contenues dans la procédure de remplacement qui suit.

1. Montez le lit complètement et appliquez les freins.
2. Selon la position du côté de lit mi-longueur à remplacer, placez les sections du sommier comme suit :
 - **Côté de tête** : montez la section de tête complètement.
 - **Côté de pied** : baissez la section de tête complètement. Montez la section de cuisse complètement, puis soulevez et rabattez la section de pied vers la tête du lit.
3. Relevez le côté de lit à réparer.
4. À l'aide d'une clé 7/16" et d'une clé à cliquet munie d'une douille 7/16", retirez les deux écrous et boulons (D) retenant les demi-coussinets (E), le glisseur de rétraction (F) et le mécanisme de côté de lit à chacun des deux supports de côtés de lit (G). Retirez les demi-coussinets et le mécanisme de leur emplacement - tenez bien les coussinets pour les empêcher de tomber au sol.

Remarque

Retirez d'abord les deux écrous et boulons d'un côté de l'ensemble et, tout en maintenant l'ensemble, terminez par ceux du côté opposé.

5. Inversez les étapes précédentes pour installer le nouvel ensemble de côté de lit.
6. Vérifiez le fonctionnement du côté de lit avant de remettre le lit en service.

Procédures d'entretien

PROCÉDURE DE REMPLACEMENT - CÔTÉ DE LIT - PLAQUE DE TRANSFERT

Outils nécessaires :

- Clé à cliquet et douille 7/16"
- Clé 7/16"
- Clé dynamométrique

Procédure :

Remarque

À moins d'indications contraires, référez-vous à la figure 3.1A, [page 14](#) pour l'illustration des références contenues dans la procédure qui suit.

1. Montez le lit complètement et appliquez les freins.
2. Selon le type et la position du côté de lit à réparer, placez les sections du sommier comme suit :
 - **Côté de tête** : levez complètement la section de tête.
 - **Côté de pied** : baissez complètement la section de tête. Levez complètement la section de cuisse, puis soulevez et rabattez la section de pied vers la tête du lit.
3. Baissez le côté de lit à réparer.
4. À l'aide d'une clé à cliquet munie d'une douille 7/16" et d'une clé 7/16", retirez les deux écrous, manchons, rondelles de métal et boulons (H) retenant la plaque de transfert (I) au mécanisme du côté de lit.

Remarque

À l'assemblage, appliquez aux écrous un couple de serrage de 75 lbf/ps.

5. Inversez les étapes précédentes pour installer la nouvelle plaque de transfert.
6. Vérifiez le fonctionnement du côté de lit avant de remettre le lit en service.

PROCÉDURE DE REMPLACEMENT - SOMMIER

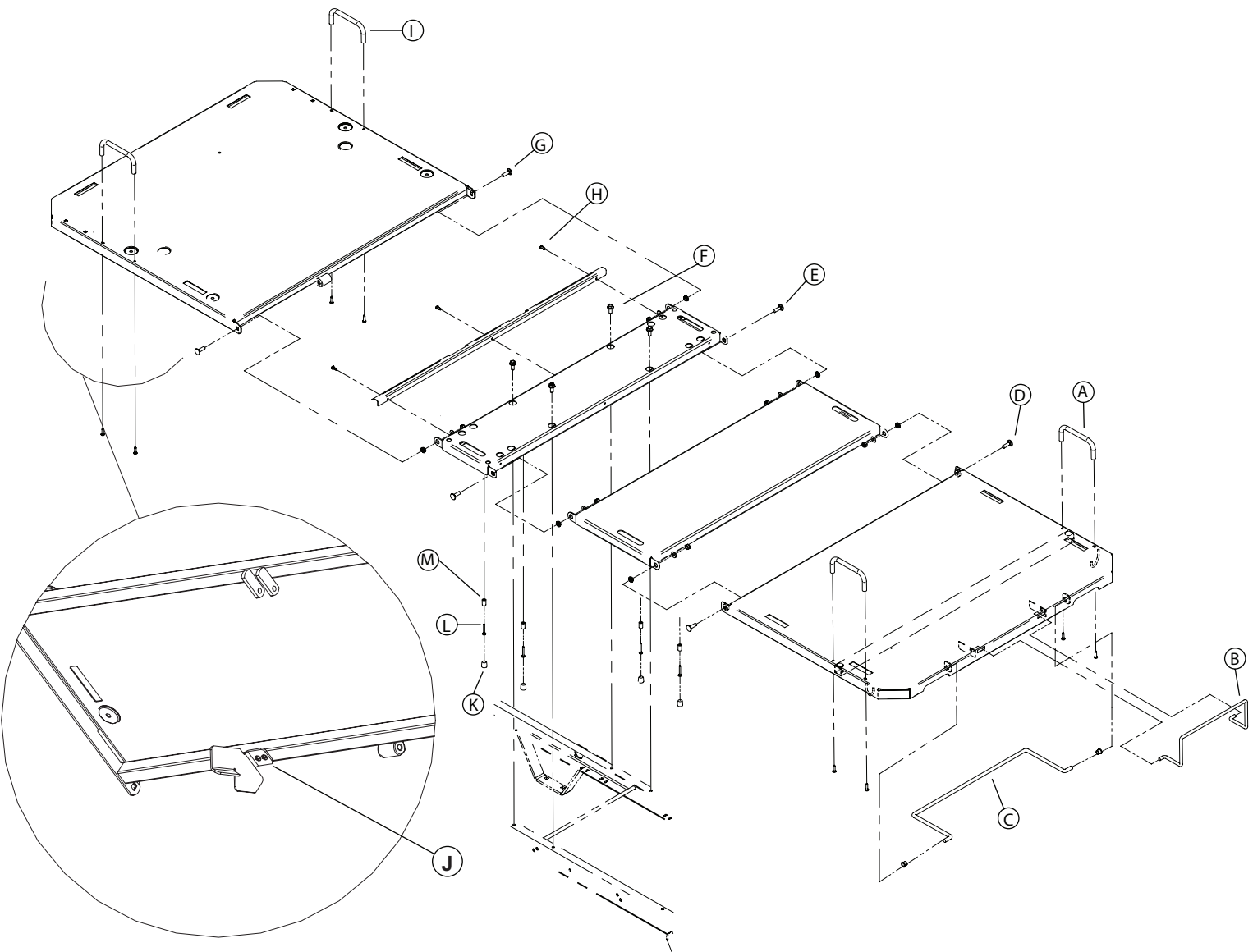


Figure 3.2A

Procédures d'entretien

PROCÉDURE DE REMPLACEMENT - SOMMIER - SECTION DE PIED

Outils nécessaires :

- Tournevis Phillips
- Clé 1/2"
- Câbles élastiques

Procédure :

1. Montez le lit complètement et appliquez les freins. Placez le sommier à l'horizontal.
2. Abaissez les côtés de lit.
3. Soulevez et rabattez la section de pied vers la tête du lit. Attachez la section au lit à l'aide de câbles élastiques.
4. À l'aide d'un tournevis Phillips, retirez les deux arrêts de matelas latéraux (A).
5. Retirez l'arrêt de matelas de pied (B).
6. Retirez le support (C) de la section de pied.
7. Enlevez les câbles élastiques et remplacez la section de pied à l'horizontal.
8. À l'aide d'une clé 1/2", retirez les deux écrous, rondelles plates, entretoises à épaulement et boulons (D) reliant la section de pied à la section de cuisse et retirez la section défectueuse.
9. Inversez les étapes précédentes pour installer la nouvelle section de pied.
10. Vérifiez la mobilité de la section de pied avant de remettre le lit en service.

Procédures d'entretien

PROCÉDURE DE REMPLACEMENT - SOMMIER - SECTION DE CUISSE

Outils nécessaires :

- Pincés à long bec
- Clé 1/2"
- Câbles élastiques

Procédure :

Remarque

À moins d'indications contraires, référez-vous à la figure 3.2A, [page 17](#) pour l'illustration des références contenues dans la procédure de remplacement qui suit.

1. Montez le lit complètement et appliquez les freins. Placez le sommier à l'horizontal.
2. Abaissez les côtés de lit.
3. Soulevez et rabattez la section de pied vers la tête du lit. Attachez la section au lit à l'aide de câbles élastiques.
4. À l'aide de pincés à long bec, retirez la goupille enroulante, les rondelles et l'axe de chape (A, Figure 3.2E, [page 26](#)) rattachant les bras du levier de la section de cuisse au tube du vérin de cuisse.
5. Retirez les câbles élastiques et ramenez la section de pied en position horizontale.
6. À l'aide d'une clé 1/2", retirez les quatre écrous, rondelles plates, entretoises à épaulement et boulons (D, E) retenant la section de cuisse aux sections de pied et de siège et retirez la section de cuisse.
7. Inversez les étapes précédentes pour installer la nouvelle section de cuisse.
8. Vérifiez la mobilité de la section de cuisse avant de remettre le lit en service.

Procédures d'entretien

PROCÉDURE DE REMPLACEMENT - SOMMIER - SECTION DE SIÈGE

Outils nécessaires :

- Clé à cliquet et douille longue 1/2"
- Clé dynamométrique
- Clé 1/2"
- Tournevis Phillips

Procédure :

Remarque

À moins d'indications contraires, référez-vous à la Figure 3.2A, [page 17](#) pour l'illustration des références contenues dans la procédure de remplacement qui suit.

1. Montez le lit complètement et appliquez les freins. Placez le sommier à l'horizontal.
2. Abaissez les côtés de lit.
3. À l'aide d'une clé à cliquet et d'une douille 1/2", retirez les quatre vis (F) retenant la section de centre au châssis.

Remarque

Une fois enlevés, les boulons à filets roulants doivent être réinstallés manuellement au début, puis serrés à fond à un couple de 135 lbf/po (14.7 Nm) à l'aide d'une clé dynamométrique.

4. À l'aide d'une clé 1/2", retirez les quatre écrous, rondelles, entretoises à épaulement et boulons (E, G) retenant la section de centre aux sections de cuisse et de tête et retirez la section de cuisse.
5. Renversez la section de siège et retirez, à l'aide d'un tournevis Phillips, les trois vis (H) retenant l'angle protecteur à la section de siège. Conservez l'angle pour la nouvelle section.
6. Inversez les étapes précédentes pour installer la nouvelle section de siège.

Procédures d'entretien

PROCÉDURE DE REMPLACEMENT - SOMMIER - SECTION DE TÊTE

Outils nécessaires :

- Tournevis Phillips
- Sangle
- Clé 1/2" (2)

Procédure :

Remarque

À moins d'indications contraires, référez-vous à la figure 3.2A, [page 17](#) pour l'illustration des références contenues dans la procédure de remplacement qui suit.

1. Montez le lit complètement et appliquez les freins.
2. Si le lit est muni de côtés de lit pleine longueur, abaissez-les.
Si par contre le lit est muni de côtés de lit mi-longueur, relevez ceux de tête et abaissez ceux de pied.
3. Retirez le panneau de tête.
4. Montez complètement la section de tête et attachez-la solidement au lit à l'aide d'une sangle.
5. À l'aide d'un tournevis Phillips, retirez les deux arrêts de matelas latéraux (I) et conservez-les pour la nouvelle section de tête.

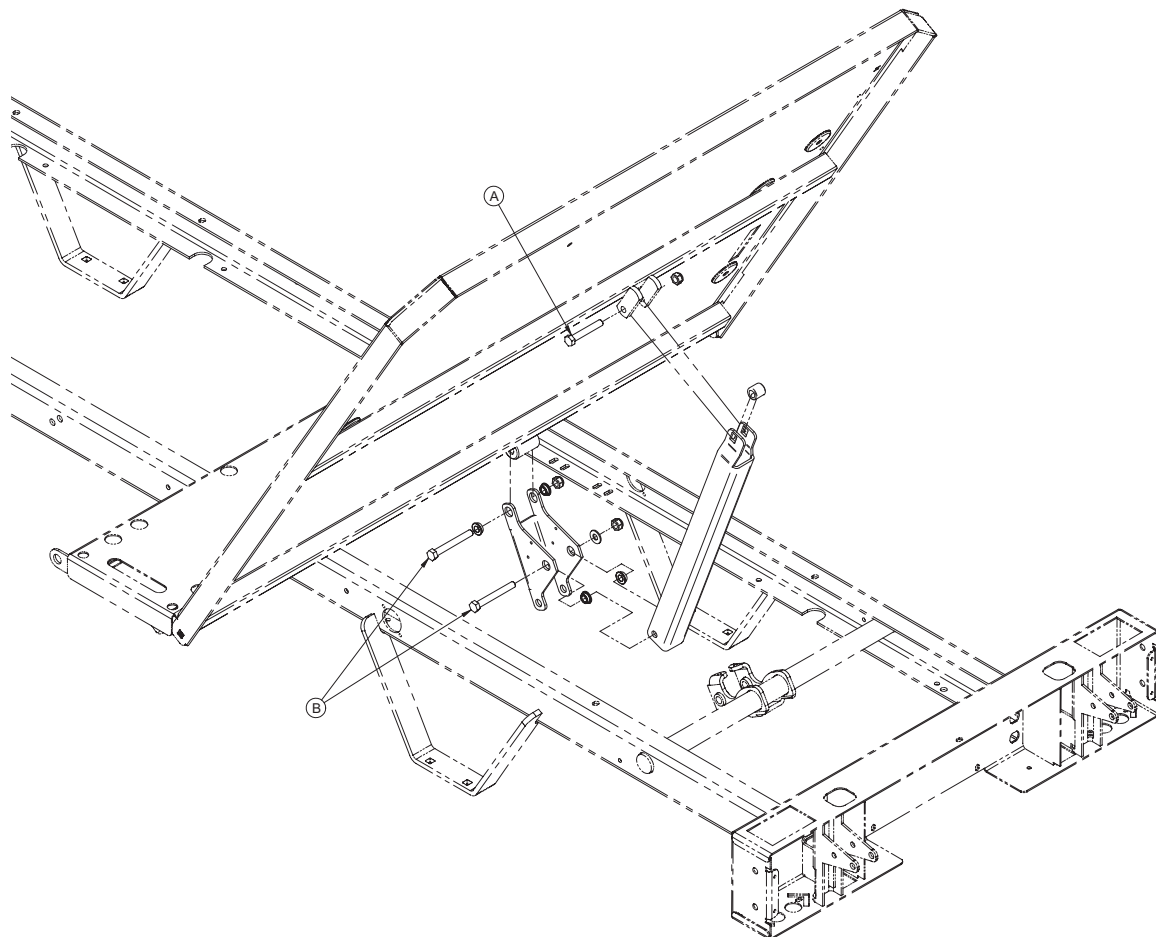


Figure 3.2B

[Retour à la table des matières](#)

Procédures d'entretien

PROCÉDURE DE REMPLACEMENT - SOMMIER - SECTION DE TÊTE (SUITE)

6. À l'aide de deux clés 1/2", retirez l'écrou bloquant, l'entretoise de nylon et le boulon (A) reliant la partie supérieure de la barre de compression à la section de tête et déposez la barre de compression.
7. À l'aide de deux clés 1/2", retirez l'écrou bloquant, les entretoises à épaulement et le boulon (B) reliant le levier de sommier à la section de tête et retirez l'ensemble levier/barre de compression.
8. Retirez la sangle et baissez manuellement la section de tête complètement.
9. Abaissez les deux côtés de lit de tête, puis utilisez un tournevis Phillips pour retirer les 4 vis (J, Figure 3.1A, [page 14](#)) retenant les deux supports de côtés de lit à la section de tête. Laissez l'ensemble supports/côtés de lit reposer sur le châssis.
10. À l'aide d'une clé 1/2", retirez les deux écrous, rondelles plates, entretoises à épaulement et boulons (G, Figure 3.2A, [page 17](#)) reliant la section de tête à la section de siège. Retirez la section de tête.
11. Inversez les étapes précédentes pour installer la nouvelle section de tête.
12. Vérifiez la mobilité de la section de tête avant de remettre le lit en service.

Procédures d'entretien

PROCÉDURE DE REMPLACEMENT - MANIVELLE

Outils nécessaires :

- Pince à étau
- Tournevis Phillips
- Perceuse et mèche 1/4"
- Poinçon 3/16" ou 1/4"
- Marteau
- Graisse OG 2
- Riveteuse ou pince
- Ciment à filet - force moyenne

Procédure :

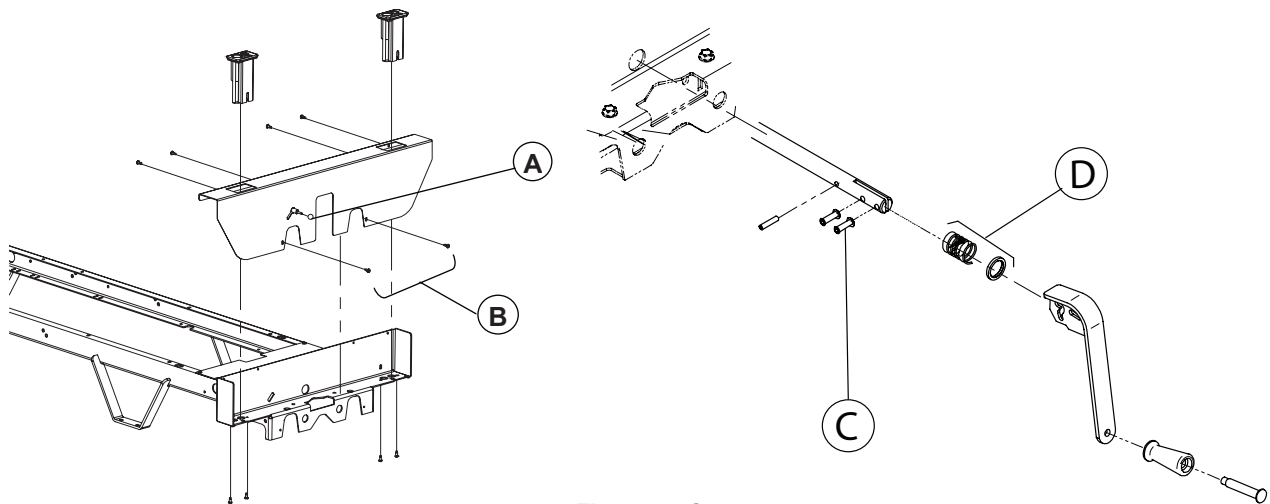


Figure 3.2C

1. Montez le lit complètement et appliquez les freins. Retirez le panneau de pied.
2. À l'aide d'une pince à étau, retirez le boulon (A) de la manette de positionnement *Trendelenburg*.

Remarque

Lors de l'assemblage du lit en usine, les filets de la manette ont été enduits d'un composé à blocage pour empêcher le bouton de se desserrer. Le bouton risque d'être difficile à desserrer d'où la recommandation d'utiliser la pince à étau avec prudence afin de ne pas briser le bouton. Au moment de revisser le bouton, enduisez les filets de la tige d'un composé à blocage de force moyenne.

3. À l'aide d'un tournevis Phillips, retirez les dix (10) vis (B) retenant le couvercle de la boîte de pied et retirez-le.
4. Tout en soutenant la manivelle avec le genou, fraisez les rivets (C) à l'aide d'une perceuse et d'une mèche 1/4".
5. Expulsez les rivets à l'aide d'un poinçon 3/16" ou 1/4" et d'un marteau. Retirez la manivelle. Laissez en place les rondelles de nylon et le ressort (D).
6. Mettez en position la nouvelle manivelle sur l'essieu après avoir graissé la partie mobile avec de la graisse OG 2.
7. Insérez deux nouveaux rivets et les bloquer en position à l'aide d'une riveteuse ou d'une paire de pince.
8. Vérifiez le fonctionnement de la nouvelle manivelle avant de remplacer les pièces précédemment retirées aux points 2 et 3.

Procédures d'entretien

PROCÉDURE DE REMPLACEMENT - VÉRIN DE LA SECTION DE TÊTE

Outils nécessaires :

- Câbles élastiques
- Clé 7/16"
- Pince à long bec
- Tournevis Phillips
- Clé à cliquet/douille 7/16"
- Pince à étau ("Vise Grip")

Procédure :

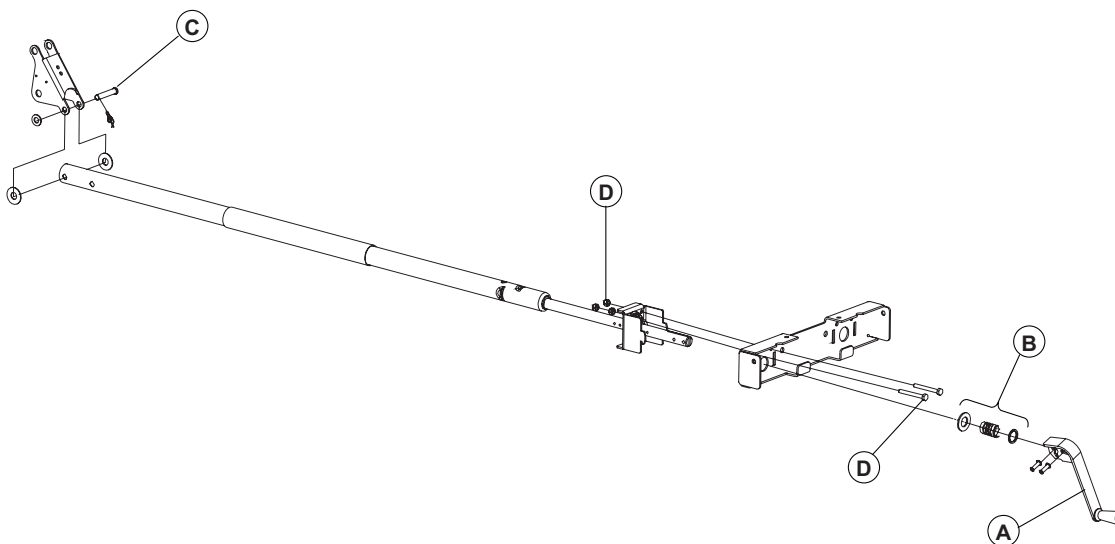


Figure 3.2D

1. Montez le lit complètement et appliquez les freins. Retirez le panneau de pied.
2. Soulevez la section de pied, rabattez-la vers la tête du lit et attachez-la au lit à l'aide d'un câble élastique.
3. Soulevez la section de tête, rabattez-la vers le pied du lit et attachez-la au lit à l'aide d'un câble élastique.
4. À l'aide d'un tournevis Phillips, retirez les 4 vis fixant la plaque de recouvrement de pied au châssis du lit.
5. Retirez le couvercle de la boîte de pied (voir les étapes 2 et 3 de la "Procédure de remplacement - manivelle", [page 23](#)).
6. Ramenez la section de tête à l'horizontal et soutenez le tube du vérin à l'aide d'un câble élastique passé sous le tube et accroché de chaque côté du châssis.
7. Retirez la manivelle (A) (voir les étapes 4 et 5 de la "Procédure de remplacement - manivelle", [page 23](#)). Retirez et conservez les 2 rondelles de nylon et le ressort (B).

Remarque

N'oubliez pas de remettre en place les rondelles et le ressort avant de replacer la manivelle.

8. À l'aide de pinces à long bec, retirez la goupille à fermeture enroulante, les rondelles et l'axe de chape (C) retenant la section de tête au tube de vérin de tête.
9. À l'aide d'une clé à cliquet/douille 7/16" et d'une clé 7/16", retirez les deux écrous et boulons (D) retenant l'assemblage du vérin de tête sur la boîte de pied.

Procédures d'entretien

PROCÉDURE DE REMPLACEMENT - VÉRIN DE LA SECTION DE TÊTE (SUITE)

10. Soulevez le support du roulement pour le dégager de son ancrage et retirez l'ensemble du vérin en le reculant vers la tête du lit.
11. Réinstallez le nouveau vérin en inversant les étapes précédentes et suivez les instructions suivantes pour bien ajuster la course du vérin de tête :
 - a. Installez temporairement la manivelle et tournez-la jusqu'à ce que la section de tête repose sur le châssis. Lorsque la section de cuisse atteint le châssis, la position de la manivelle devrait normalement être verticale ou proche de cette position.
 - b. Installez définitivement la manivelle en vous assurant que la poignée de la manivelle soit en bas au moment de l'installation.

Remarque

Le réglage de la course du vérin est correct lorsque la poignée est positionnée verticalement (le mots "Push" doit être visible) ou presque au moment où la section de tête atteint le châssis et y repose.

12. Vérifiez l'ajustement du vérin en relevant puis en abaissant la section de tête avant de retourner le lit en service.

Procédures d'entretien

PROCÉDURE DE REMPLACEMENT - VÉRIN DE LA SECTION DE CUISSE

Outils nécessaires :

- Câbles élastiques
- Clé 7/16"
- Tournevis Phillips
- Clé à cliquet/douille 7/16"
- Pince à long bec

Procédure :

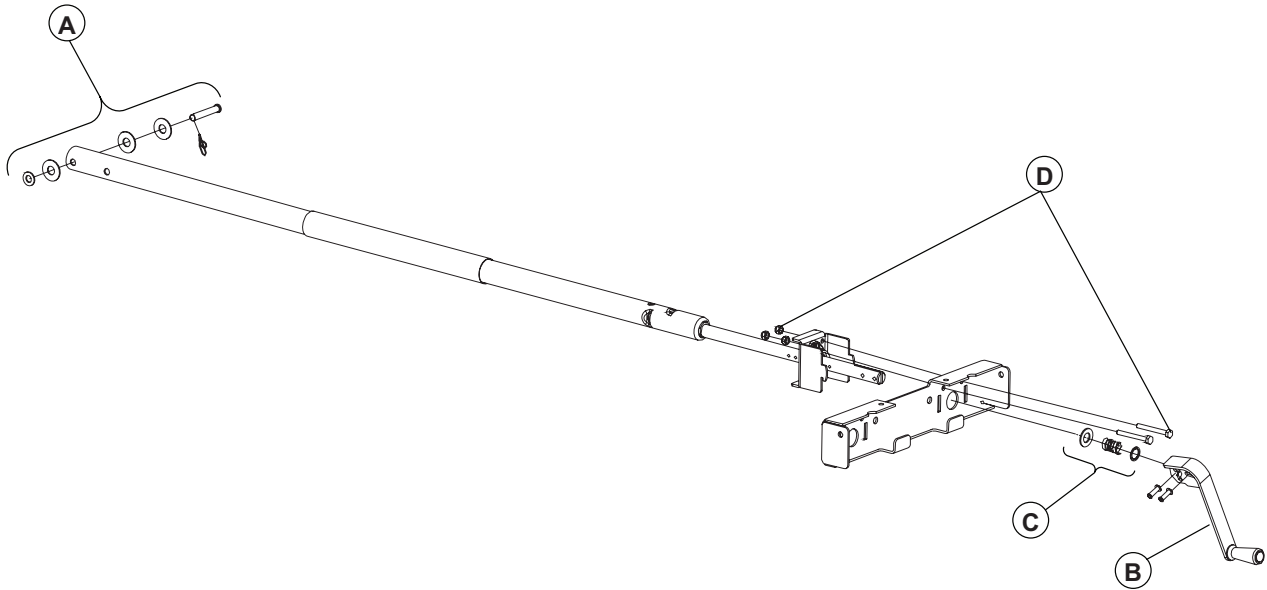


Figure 3.2E

1. Montez le lit complètement et appliquez les freins. Retirez le panneau de pied.
2. Soulevez la section de pied, rabattez-la vers la tête du lit et attachez-la au lit à l'aide d'un câble élastique. La section de cuisse doit être à l'horizontal.
3. À l'aide d'un tournevis Phillips, retirez les 4 vis fixant la plaque de recouvrement de pied au châssis du lit.
4. Soutenez le tube du vérin à l'aide d'un câble élastique passé sous le tube et accroché de chaque côté du châssis.
5. Retirez le couvercle de la boîte de pied (voir les étapes 2 et 3 de la "Procédure de remplacement - manivelle", [page 23](#)).
6. Retirez la manivelle (B) (voir les étapes 4 et 5 de la "Procédure de remplacement - manivelle", [page 23](#)). Retirez et conservez les deux rondelles de nylon et le ressort (C).

Remarque

N'oubliez pas de remettre en place les rondelles et le ressort avant de replacer la manivelle.

7. À l'aide de pinces à long bec, retirez la goupille à fermeture enroulante, les rondelles et l'axe de chape (A) retenant la section de cuisse au tube de vérin de cuisse.

Procédures d'entretien

PROCÉDURE DE REMPLACEMENT - VÉRIN DE LA SECTION DE CUISSE (SUITE)

Remarque

Au moment de la réinstallation du nouveau vérin de cuisse, tournez tranquillement le tube dans l'une ou l'autre direction pour aligner ses trous avec ceux du levier de la section de cuisse.

8. À l'aide d'une clé à cliquet/douille 7/16" et d'une clé 7/16", retirez les deux écrous et boulons (D) retenant l'assemblage du vérin de cuisse.

Remarque

Resserrez les deux écrous (D) en utilisant une force moyenne.

9. Soulevez le support du roulement pour le dégager de son ancrage et retirez l'ensemble du vérin en le reculant vers la tête du lit.
10. Réinstallez le nouveau vérin de cuisse en inversant les étapes précédentes et suivez les instructions suivantes pour bien ajuster :
 - a. Installez temporairement la manivelle et tournez-la pour lever la section de cuisse puis redescendez la section jusqu'à ce qu'elle repose sur le châssis. Lorsque la section de cuisse atteint le châssis, la position de la manivelle devrait normalement être verticale ou proche de cette position.
 - b. Installez définitivement la manivelle en vous assurant que la poignée de la manivelle est en bas au moment de l'installation.

Remarque

Le réglage de la course du vérin est correct lorsque la poignée est positionnée verticalement (le mot "Push" doit être visible lorsque l'on se tient au pied du lit) ou presque au moment où la section de tête atteint le châssis et y repose.

11. Vérifiez l'ajustement en relevant puis en abaissant la section de cuisse avant de retourner le lit en service.

Procédures d'entretien

LUBRIFICATION DE LA VIS DES VÉRINS DE LA SECTION DE TÊTE ET DE LA SECTION DE CUISSE

Outils nécessaires :

- Tournevis Phillips
- Câbles élastiques
- Graisse OG 2
- Pinceau à graisse

Procédure :

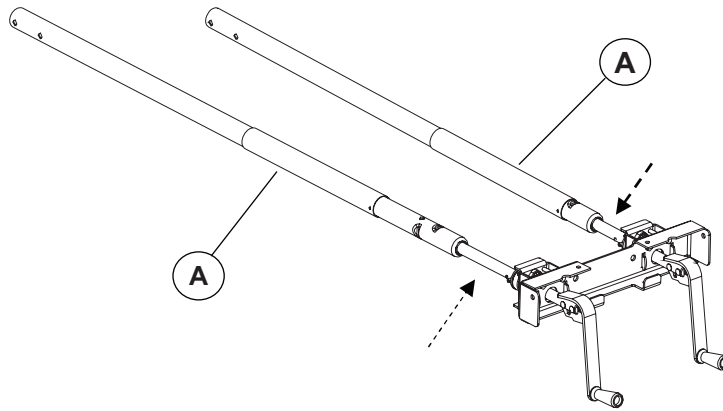


Figure 3.2F

1. Montez le lit complètement et appliquez les freins.
2. Montez la section de tête complètement (dans cette position, le vérin de tête atteindra son extension maximum) et mettez la section de cuisse en position horizontale (dans cette position, le vérin de cuisse atteindra son extension maximum).
3. Rabattez manuellement la section de pied vers la tête du lit et attachez-la à l'aide de câbles élastiques.
4. À l'aide d'un tournevis Phillips, retirez les vis retenant la plaque de recouvrement de pied au châssis.
5. Dégagez les tubes de protection en plastique gris (A) des goupilles ressort les retenant et glissez les tubes de protection vers l'arrière afin de découvrir les vis.
6. Appliquez de la graisse à l'aide d'un pinceau sur les filets des deux vis. Assurez-vous que la graisse atteint le creux des filets et remettez les tubes de protection en place. Remplacez la plaque de recouvrement.
7. Retirez les câbles élastiques et remplacez la section de pied à sa position normale. Actionnez plusieurs fois la section de tête et de cuisse complètement afin de répandre uniformément la graisse avant de remettre le lit en service.

Procédures d'entretien

MÉCANISME D'ÉLEVATION DU LIT - REMPLACEMENT DE L'ÉCROU MOULÉ ET/OU DE LA VIS DE PIED

Outils nécessaires:

2 chandelles

2 clés 9/16"

Clé à cliquet et douille 1/2"

Marteau caoutchouc

Câbles élastiques

Tournevis Phillips

Poinçon 7/32"

Ciment à filet - force moyenne

Clé 1/2"

Marteau

Clé Allen 1/8"

Clé Allen 1/16"

Procédure :

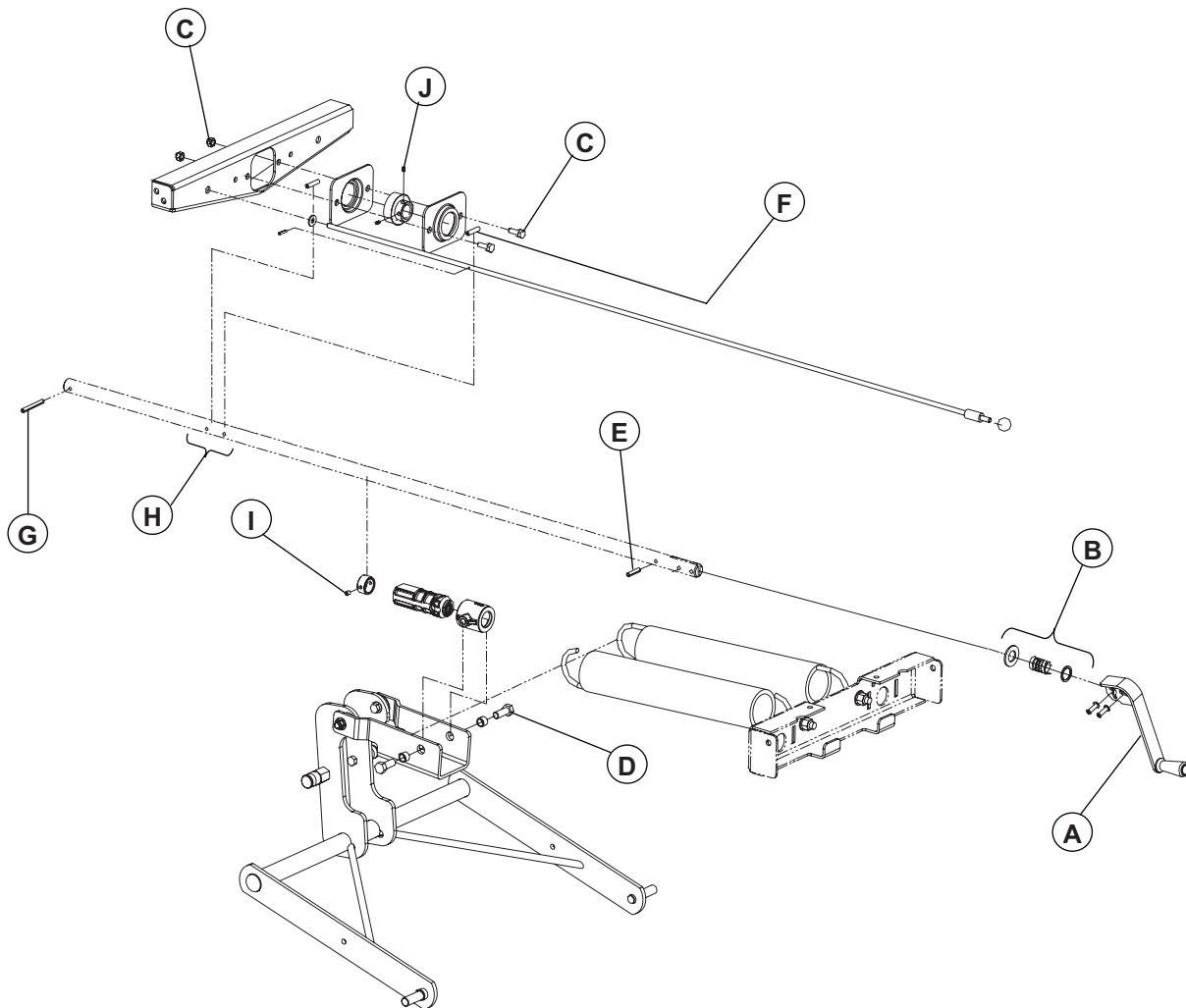


Figure 3.3A

1. Montez le lit complètement et appliquez les freins. Retirez le panneau de pied.
2. Montez la section de cuisse complètement. Soulevez la section de pied, rabattez-la vers la tête du lit et attachez-la au lit à l'aide d'un câble élastique.
3. À l'aide d'un tournevis Phillips, retirez les 4 vis fixant la plaque de recouvrement de pied au châssis du lit
4. Placez 2 chandelles sous les deux balanciers du lit.
5. Baissez le lit jusqu'à ce qu'il repose sur les 2 chandelles.

Procédures d'entretien

MÉCANISME D'ÉLEVATION DU LIT - REMPLACEMENT DE L'ÉCROU MOULÉ ET/OU DE LA VIS DE PIED (SUITE)

6. Retirez le couvercle de la boîte de pied (voir les étapes 2 et 3 de la "Procédure de remplacement - manivelle", [page 23](#)).
7. Retirez la manivelle (A) (voir les étapes 4 et 5 de la "Procédure de remplacement - manivelle", [page 23](#)). Retirez et conservez les deux rondelles de nylon et le ressort (B).

Remarque

N'oubliez pas de remettre en place les rondelles et le ressort avant de replacer la manivelle.

8. À l'aide d'une clé 1/2" ainsi que d'une clé à cliquet/douille 1/2", retirez les deux écrous et boulons (C) retenant les supports du roulement au châssis.
9. Retirez à l'aide de deux clés 9/16", les 2 boulons (D) retenant l'écrou et son support au harnais d'élévation.

Remarque

Remettez du ciment à filet de force moyenne sur la portion de la nouvelle vis parcourue par l'écrou. Référez-vous à l'ancienne vis pour déterminer la zone à graisser.

10. À l'aide d'un poinçon 7/32" et d'un marteau, enlevez la goupille à ressort (E) de la vis. Retirez l'assemblage de la vis de pied de sa position et déposez le tout sur un établi.
11. Retirez toutes les autres goupilles à ressort (F, G et H).
12. À l'aide d'une clé Allen 1/16", desserrez la vis de pression (I) maintenant en place la butée de fin de course et retirez celle-ci de la vis.
13. À l'aide d'une clé Allen 1/8", desserrez les deux vis de pression (J) maintenant en place le roulement. Dégagez et retirez le roulement de la vis en utilisant un marteau en caoutchouc car du ciment à filet a été utilisé à l'assemblage pour maintenir le roulement en place.

Remarque

Remettez du ciment à filet de force moyenne sur la vis et sur les vis de pression avant de replacer le roulement et serrez les vis de pression (J).

14. Retirez l'écrou défectueux de la vis. Remplacez le nouvel écrou sur la vis.
15. Réinstallez toutes les composantes de la vis de pied, à l'exception de la goupille à ressort (E).
16. Réinstallez la nouvelle vis sur le mécanisme d'élévation en inversant les étapes précédentes telles que décrites ci-dessous :
 - a. Réinstallez la goupille à ressort (E).
 - b. Réinstallez la manivelle (A) (voir les étapes 6 et 7 de la "Procédure de remplacement - manivelle", [page 23](#)).
 - c. Refermez le couvercle de la boîte de pied.
 - d. Remettez du ciment à filet de force moyenne sur le bouton de la manette de positionnement *Trendelenburg* et réinstallez-le.
 - e. Remettez la plaque de recouvrement de pied au châssis du lit en vissant les 4 vis.
17. Vérifiez la fonction d'élévation du lit avant de le remettre en service.

Procédures d'entretien

BASE - PÉDALE DE FREIN/DIRECTION

Outils nécessaires :

- Clé à cliquet et douille 1/2"
- Marteau caoutchouc
- Clé dynamométrique

Procédure :

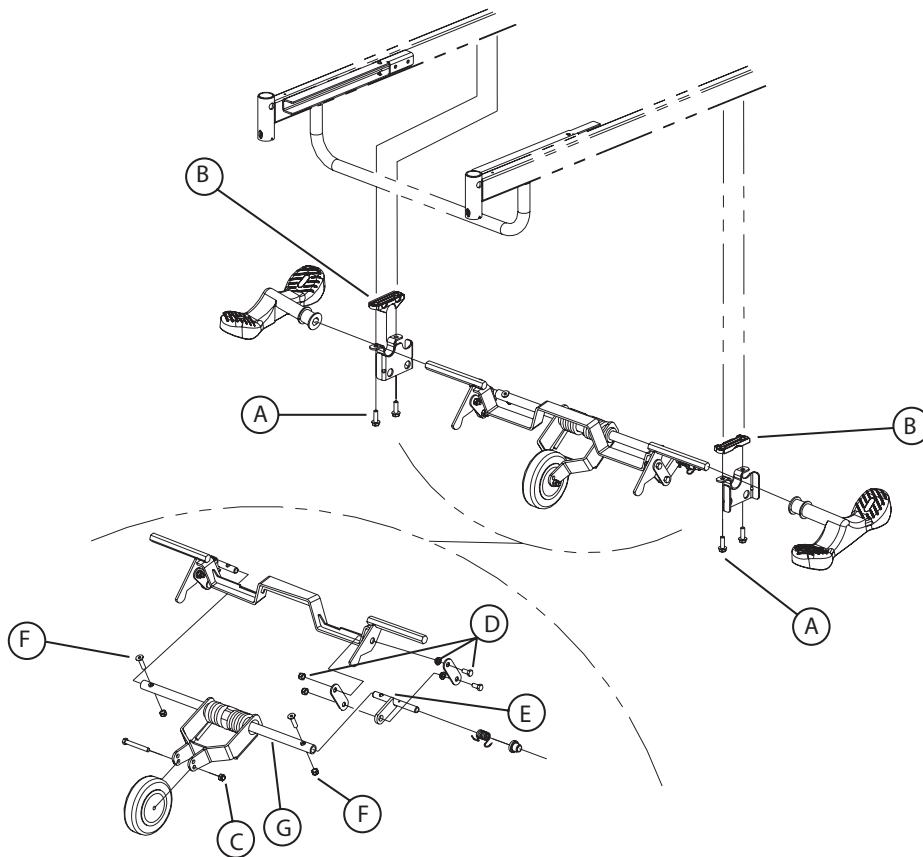


Figure 3.4A

1. Montez le lit complètement.
2. Placez la pédale de frein/direction au neutre.
3. À l'aide d'une clé à cliquet munie d'une douille 1/2", retirez les deux boulons (A) retenant le support de 5° roue (en option) ou le support de balancier (A, Figure 3.4B, [page 34](#)) du côté de la pédale à remplacer et déposez le support. Récupérez l'espaceur moulé (B).

Remarque

Une fois enlevés, les boulons à filet roulant doivent être réinstallés manuellement au début puis serrés à fond à un couple de 135 lbf/po (14.7 Nm) à l'aide d'une clé dynamométrique.

4. Retirez la pédale de la tige du levier d'actionnement. Utilisez un marteau caoutchouc si nécessaire.
5. Inversez les étapes précédentes pour installer la nouvelle pédale.

Procédures d'entretien

BASE - ROULETTE DE LA 5^E ROUE (EN OPTION)

Outils nécessaires :

- Clé 1/2" (2)

Procédure :

Remarque

À moins d'indications contraires, référez-vous à la figure 3.4A, [page 31](#) pour l'illustration des références contenues dans la procédure de remplacement qui suit.

1. Montez le lit complètement.
2. Placez la pédale de frein/direction au neutre.
3. À l'aide de deux clés 1/2", retirez l'écrou et le boulon (C) retenant la roulette au bras plongeant.
4. Inversez les étapes précédentes pour installer la nouvelle roulette.

BASE - ENSEMBLE DE LA 5^E ROUE (EN OPTION)

Outils nécessaires :

- Clé 1/2"
- Clé à cliquet et douille 1/2"
- Marteau caoutchouc

Procédure :

Remarque

À moins d'indications contraires, référez-vous à la figure 3.4A, [page 31](#) pour l'illustration des références contenues dans la procédure de remplacement qui suit.

1. Montez le lit complètement.
2. Placez la pédale de frein/direction au neutre.
3. À l'aide d'une clé 1/2", retirez les deux écrous, rondelles, entretoises à épaulement et boulons (F1, Figure 3.4B, [page 34](#)) reliant l'extrémité des barres de liaison aux leviers de blocage, du côté des pédales. Pour un lit équipé du système de freinage aux quatre roues (en option), retirez aussi la boulonnerie reliant l'extrémité des deux barres de liaison aux mêmes leviers de blocage.
4. À l'aide d'une clé à cliquet et d'une douille 1/2", retirez les quatre boulons (A) retenant les deux supports de 5^e roue à la base. Récupérez les espaceurs moulés (B). Retirez le mécanisme complet.
5. Retirez les deux pédales de frein/direction des tiges du levier d'activation. Utilisez un marteau caoutchouc si nécessaire.
6. Récupérez les deux leviers de blocages (C, Figure 3.4B, [page 34](#)).
7. Inversez les étapes précédentes pour installer le nouvel ensemble de la 5^e roue.
8. Vérifiez le fonctionnement de la 5^e roue avant de remettre le lit en service.

Procédures d'entretien

BASE - ENSEMBLE DU BRAS PLONGEANT DE LA 5^E ROUE (EN OPTION)

Outils nécessaires :

- Clé à cliquet et douille 1/2"
- Clés 1/2" (2)
- Clé Allen 3/16"

Procédure :

Remarque

À moins d'indications contraires, référez-vous à la figure 3.4A, [page 31](#) pour l'illustration des références contenues dans la procédure de remplacement qui suit.

1. Montez le lit complètement.
2. Placez la pédale de frein/direction au neutre.
3. À l'aide d'une clé à cliquet et d'une douille 1/2", retirez les deux boulons (A) retenant le support gauche ou droit de la 5^e roue à la base. Déposez le support au sol et récupérez l'espaceur moulé (B).
4. À l'aide de deux clés 1/2", retirez l'écrou, les entretoises à épaulement et le boulon (D) retenant le levier de torsion (E) à la partie inférieure du contre-levier.
5. À l'aide d'une clé 1/2" et d'une clé Allen 3/16", retirez les deux écrous et vis Allen (F) retenant les deux leviers de torsion (E) de chaque côté de l'arbre de levier (G).

Remarque

À l'assemblage, vissez d'abord à fond les vis Allen avant de visser les écrous.

6. Dégagez l'ensemble du bras plongeant des leviers de torsion et retirez-le.
7. À l'aide de deux clés 1/2", retirez l'écrou et le boulon (C) retenant la roulette au bras plongeant et conservez-la pour le nouvel ensemble.
8. Inversez les étapes précédentes pour installer le nouvel ensemble du bras plongeant.
9. Vérifiez le fonctionnement de la 5^e roue avant de remettre le lit en service.


Procédures d'entretien

ROULETTE DU LIT

Outils nécessaires :

- Chandelle
- Pincès à long bec
- Clé 1/2"


Procédure :

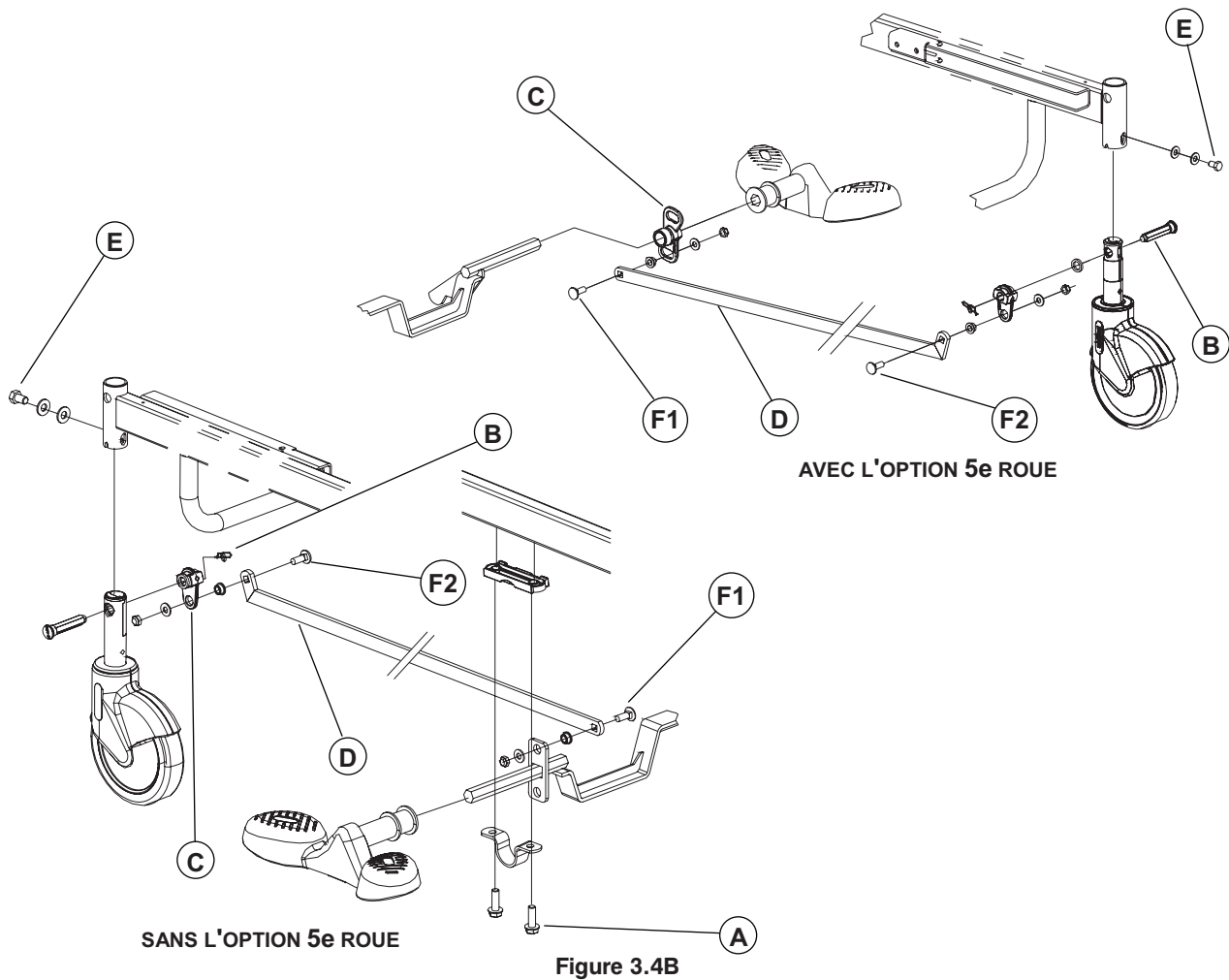

1. Montez le lit complètement.
2. Mettez la pédale de frein/direction au neutre.
3. Placez une chandelle sous le châssis du côté de la roulette à changer.
4. Si présent, retirez le capot (en option) de la roulette défectueuse.
5. Descendez le lit jusqu'à ce que la roulette soit au moins à six pouces du sol.
6. Si la roue fait partie du mécanisme de freinage, retirez, à l'aide de pincès à long bec, la goupille à fermeture enroulante, la rondelle et l'axe de blocage (B) reliant la tige de la roulette au levier de blocage (C) et à la barre de liaison (D).

Procédures d'entretien

ROULETTE DU LIT (SUITE)

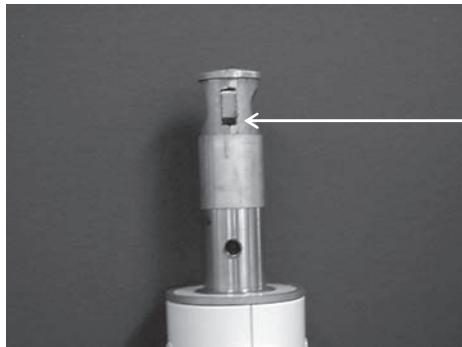

Remarque

La tige d'une roulette faisant partie du mécanisme de freinage doit être orientée correctement avant de l'installer sur la base. L'illustration ci-contre montre le côté de la tige qui doit faire face à l'intérieur du lit : c'est le côté présentant la plus large ouverture sous la came en position neutre.

7. À l'aide d'une clé 1/2", retirez le boulon et les rondelles (E) retenant la roulette à la base.

Remarque

Au moment de serrer définitivement le boulon (E), assurez-vous que la tige de la roulette est complètement enfoncée dans la douille de montage.

8. Inversez les étapes précédentes pour installer la nouvelle roulette.
9. Dans le cas où la nouvelle roulette fait partie du mécanisme de freinage, appliquez les freins et vérifiez qu'elle se verrouille bien avant de remettre le lit en service.

BARRE DE LIAISON DU MÉCANISME DE FREINAGE

Outils nécessaires :

- Clé 1/2"

Procédure :

Remarque



À moins d'indications contraires, référez-vous à la figure 3.4B, [page 34](#) pour l'illustration des références contenues dans la procédure de remplacement qui suit.

1. Montez le lit complètement.
2. À l'aide d'une clé 1/2", retirez l'écrou, l'entretoise à épaulement, la rondelle et le boulon (F1, F2) retenant chaque extrémité de la barre de liaison.
3. Retirez la barre de liaison défectueuse.
4. Inversez les étapes précédentes pour installer la nouvelle barre de liaison.
5. Vérifiez le mécanisme de freinage avant de remettre le lit en service.

Ensemble de poteaux - L23-005

Référence seulement : L23-005-03

PIED/
FOOT

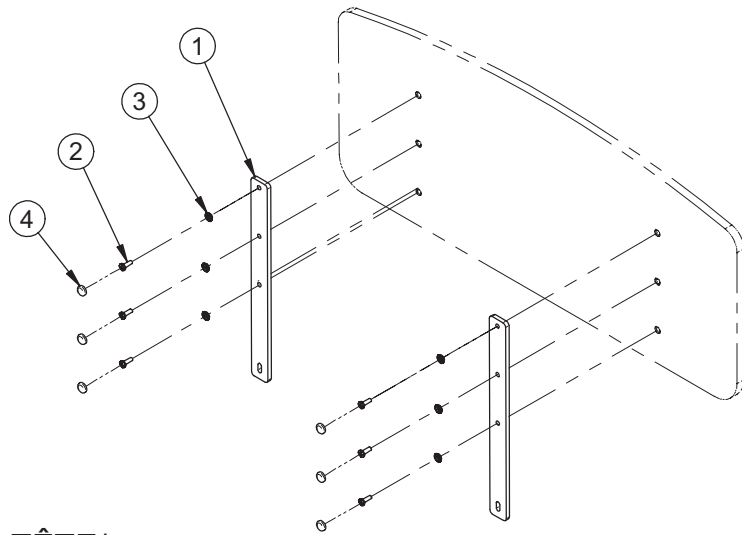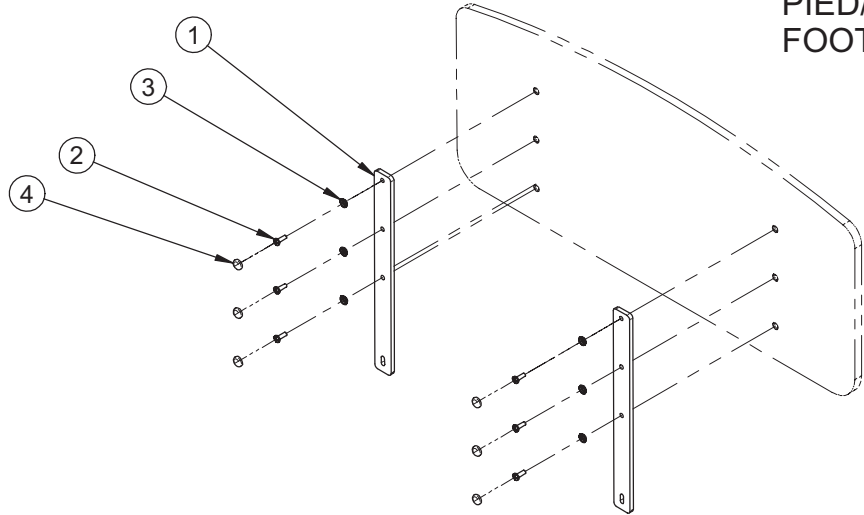


TÊTE/
HEAD

Référence seulement : L23-005G-05

Item	Numéro de pièce	Description	Quantité
1	23-0124G	Poteau	4
2	VV33A1N24-S	Vis mécanique tête pan Phillips 1/4-20 x 3/4" Scotch Grip	12
3	QPPF1521	Rondelle métal diamètre 1/4"	6
4	QPPF1514-1	Bouchon de plastique blanc	6

Base - L23-006G

Référence seulement : L23-006-01

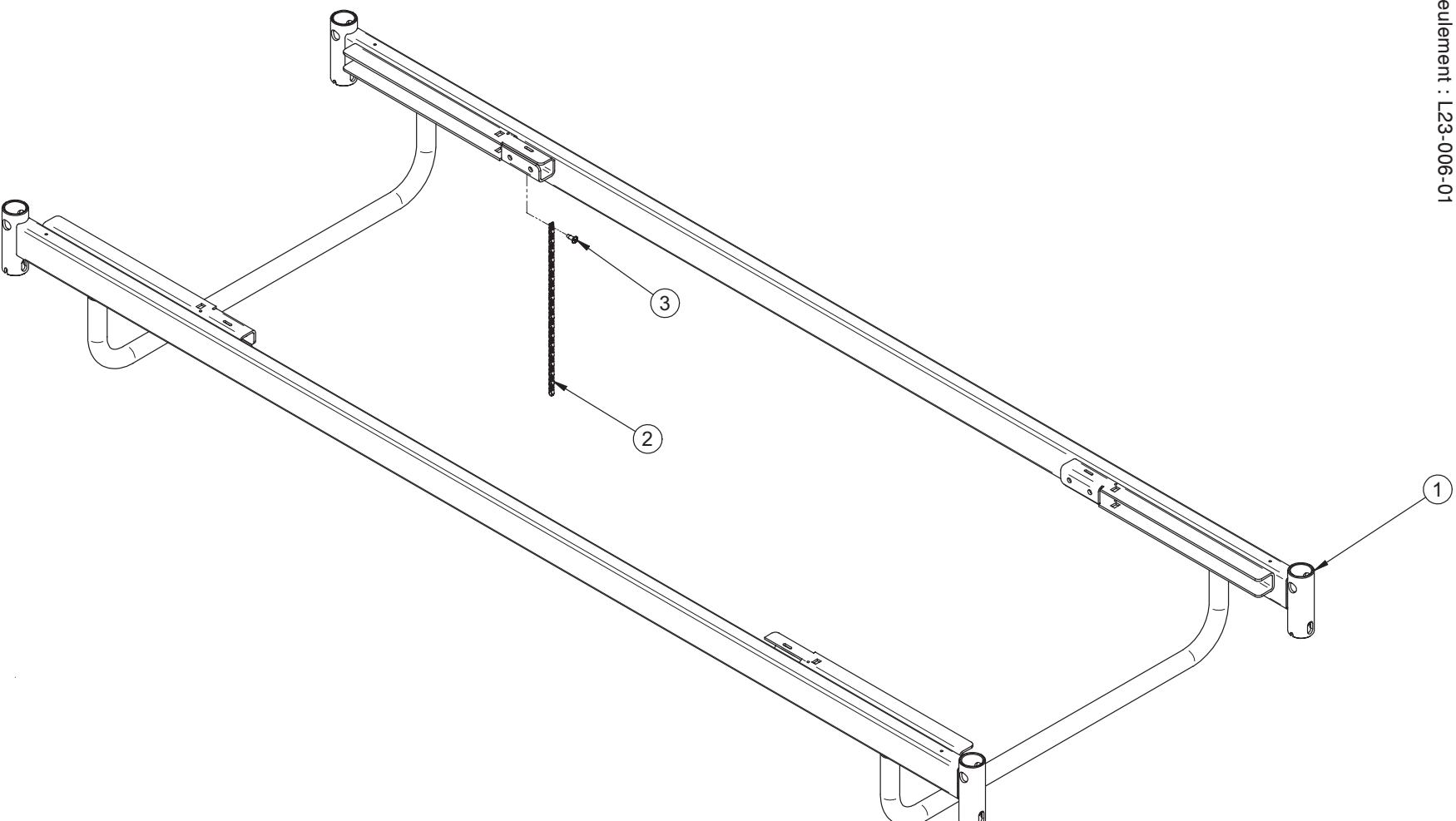


Base - L23-006

Référence seulement : L23-006G-02


Item	Numéro de pièce	Description	Quantité
1	25-0108G	S.A. Base	1
2	28-0469	Chaîne de mise à la terre	1
3	VV83A9G16	Vis taraudeuse tête pan Phillips type B #10 x 1/2" p.z.	1

Mécanisme d'élévation - L23-009

Référence seulement : L23-009-11

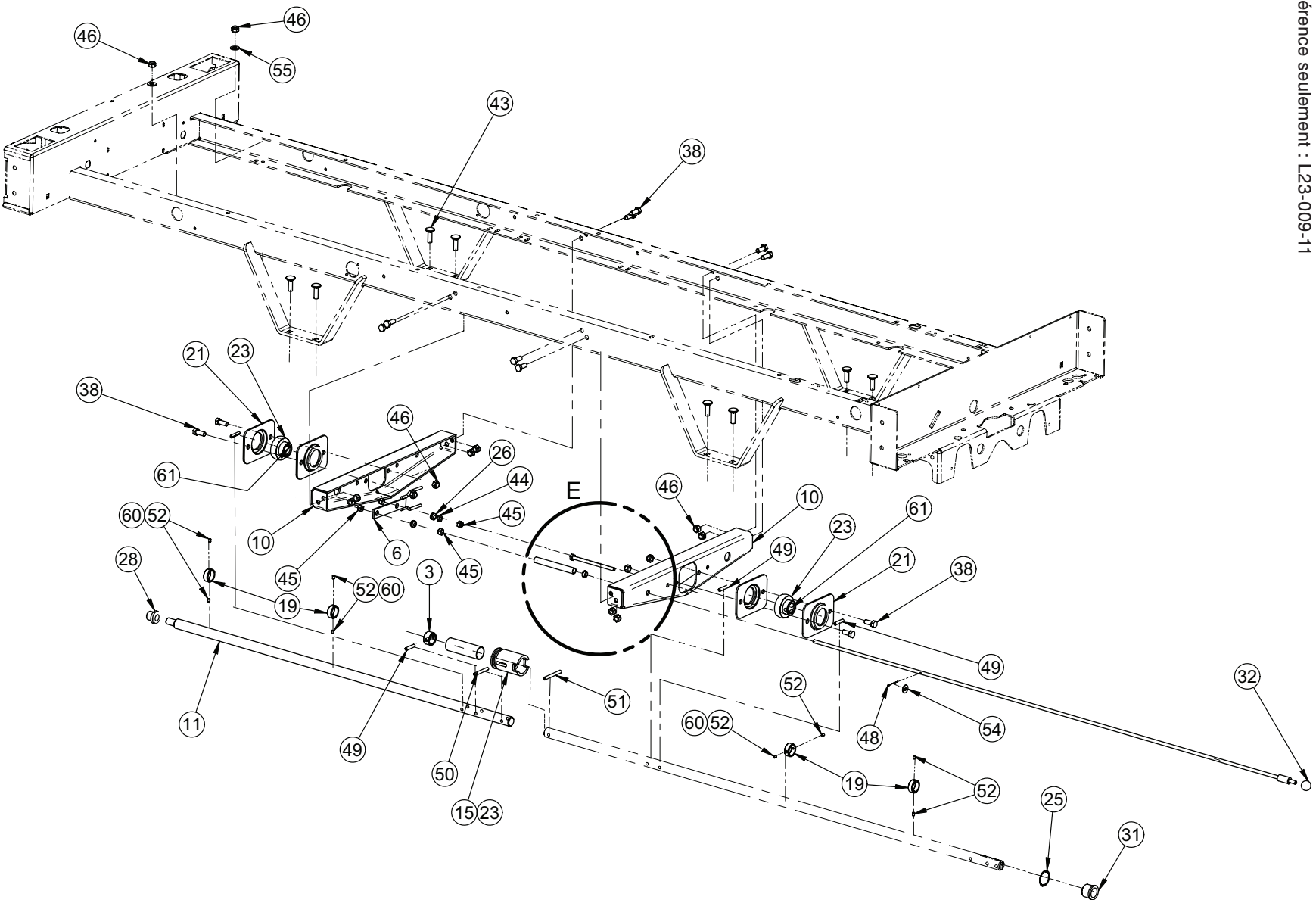


Mécanisme d'élévation - L23-009

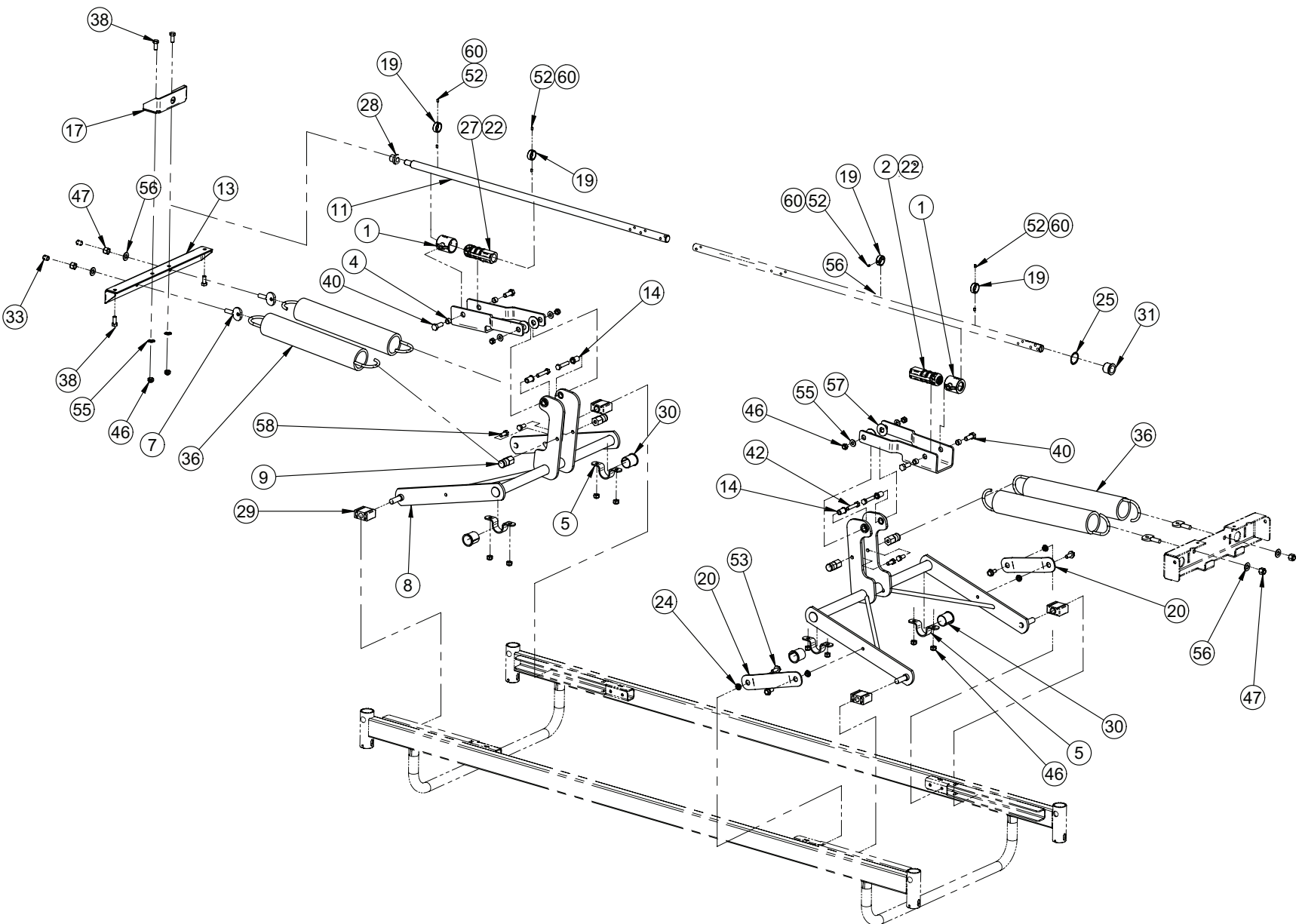

Retour à la table des matières

Mécanisme d'élévation - L23-009

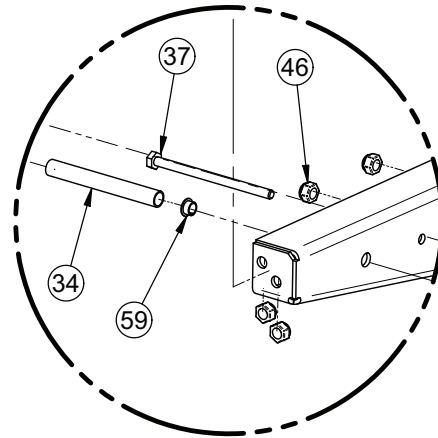

DETAIL E

Référence seulement : L23-009-06

Item	Numéro de pièce	Description	Quantité
1	QPA13-0674	Support d'écrou	2
2	QP13-0675-11	Écrou "Stub Acme" droit	1
3	1311P017Z	Bloqueur de vis zinc	1
4	14403Z	Espaceur	4
5	14662Z	Bride d'attache	4
6	18108G	Fourchette	1
7	18144	Vis d'ajustement de ressort	4
8	23-0234G	S.A. Balancier	2
9	23-0353Z	Support de ressort	4
10	23-0355G	Traverse de châssis	4
11	23-0375Z	Vis de tête du mécanisme d'élévation	1
12	23-0379G	Harnais de vis d'élévation	2
13	23-0385G	Traverse de retenue des ressorts	1
14	23-0456	Espaceur	4
15	23-0538	Boîte de couplage	1
16	23-0539Z	S.A. Tige d'embrayage	1
17	23-0543G	Support de vis	1
19	23-0575Z	Butée de vis	4
20	25-0281G	Stabilisateur	2
21	493G	Plaque de roulement diamètre 3/4"	4
22	M0019	Graisse Petro Canada OG 2	0.0300
23	QBAS204012	Roulement 3/4"	2
24	QDF17-0020	Entretoise à épaulement diamètre 5/16 x 0.210"	4
25	QDF7852	Bague de retenue à dents 1"	1
26	QDF9506	Rondelle isolante 1/4"	2
27	QP13-0676-01	Écrou "Stub Acme" gauche	1
28	QPN-13-0159	Coussinet de nylon diamètre interne 1/2"	1
29	QPN-1310P009	Glisseur en nylon	4
30	QPN-18121	Palier du cadre moulé	4
31	QPN-18315	Coussinet de nylon diamètre interne 3/4"	1



[Retour à la table des matières](#)

Mécanisme d'élévation - L23-009

Item	Numéro de pièce	Description	Quantité
32	QPPB0301	Bouton rond numéro 1/4"-20 x 3/4"	1
33	QPVA0006	Embout de vinyle noir pour tige 5/16" x 1/2" lg	2
34	QRC18135	Ressort de compression 0.380" intérieur x 3 3/4" lg x 0.037"	1
35	QRCL498	Ressort de compression 1" x 3" lg	1
36	QRE18130	Ressort d'extension 2.3" extérieur x 16" p.z.	4
37	VB15A1N64FT	Boulon hexagone 1/4-20 x 4" grade 5 p.z.	1
38	VB15A1O24	Boulon hexagone 5/16-18 x 3/4" grade 5 p.z.	16
40	VB15A1P32-S	Boulon hexagone 3/8-16 x 1" grade 5 p.z. Scotch Grip	4
42	VB15A1O40	Boulon hexagone 5/16-18 x 1 1/2" grade 5 p.z.	4
43	VB35A1O32	Boulon à carrosserie petit cou 5/16-18-1 p.z. grade 5	8
44	VE20A1N	Contre-écrou hexagone 1/4-20 p.z.	1
45	VE30A1N	Écrou hexagone blocage nylon 1/4-20 p.z.	4
46	VE30A1O	Écrou hexagone blocage nylon 5/16-18 p.z.	28
47	VE30A1P	Écrou hexagone blocage nylon 3/18-16 p.z.	4
48	VG40B0332	Goupille fendue 3/32" x 1"	1
49	VG10B0732	Goupille à ressort diamètre 7/32" x 1" lg	4
50	VG10B0742	Goupille à ressort diamètre 7/32" x 1 5/8" lg	1
51	VG10B0748	Goupille à ressort 7/32" x 2"	1
52	VV60B1E08	Vis pression six pans creux numéro 8-32 x 1/4"	8
53	VVB4A1O24	Boulon 5/16"-18 x 3/4" filet roulant	4
54	VW10A08	Rondelle plate 1/4" SAE p.z.	1
55	VW10A10	Rondelle plate 5/16" SAE p.z.	8
56	VW10A12	Rondelle plate 3/8" SAE p.z.	4
57	VW10C173602	Rondelle nylon 1/2" diamètre interne x 1 1/4" diamètre	4
58	VB15A1O24-S	Boulon hexagone 5/16-18 x 3/4" grade 5 p.z.	4
59	QPNI2402	Coussinet en nylon 5/16"	1
60	M0008	Ciment à filets - force moyenne (bleu)	0.0003
61	M0015	Ciment à filets - force moyenne (vert)	0.0500

Châssis - L23-010

Référence seulement : L23-010-08

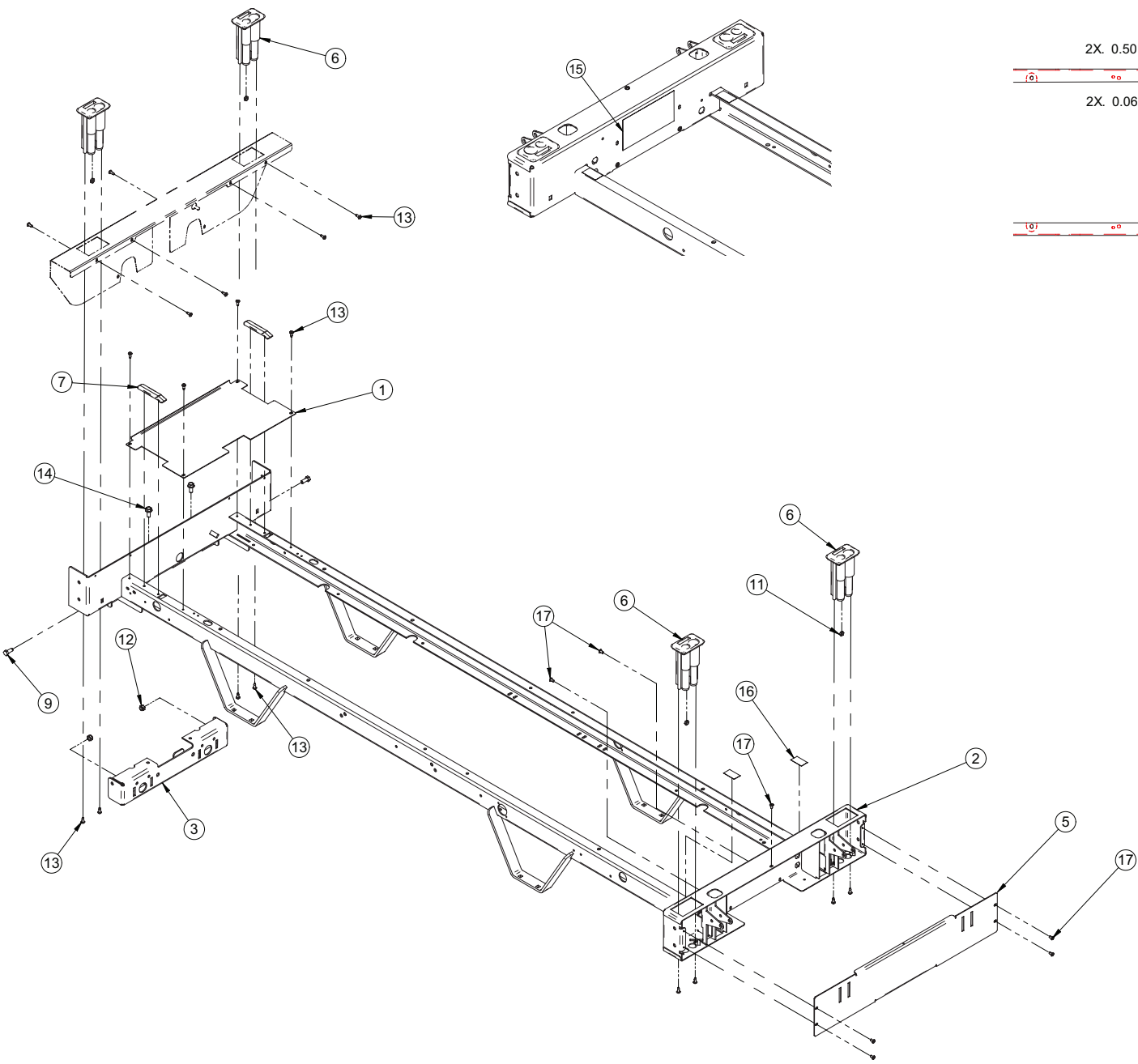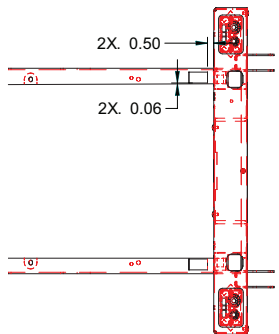


Châssis - L23-010

Référence seulement : L23-010G-04

Item	Numéro de pièce	Description	Quantité
1	23-0167G	Tôle de recouvrement de pied	1
2	23-0351G	S.A. Châssis	1
3	23-0352G	Traverse de pied	1
5	23-0362G	Couvercle de la boîte de tête	1
6	QP17-0121-07	Bloc porte-tige	4
7	QP23-0257	Glisseur de sommier	2
9	VB15A1O24	Boulon hexagone 5/16-18 x 3/4" grade 5 p.z.	2
11	VE20A1N	Contre-écrou hexagone 1/4-20 p.z.	4
12	VE30A1O	Écrou hexagone blocage nylon 5/16-18 p.z.	2
13	VV83A9G16	Vis taraudeuse tête pan Phillips type B #10 x 1/2" p.z.	25
14	VVB4A1O24	Boulon 5/16"-18 x 3/4" filet roulant	2
15	QE71-0861-F	Autocollant manufacturier	1
16	QE71-1069	Autocollant protection de châssis	2

Sommiers - L23-016

Référence seulement : L23-016-00

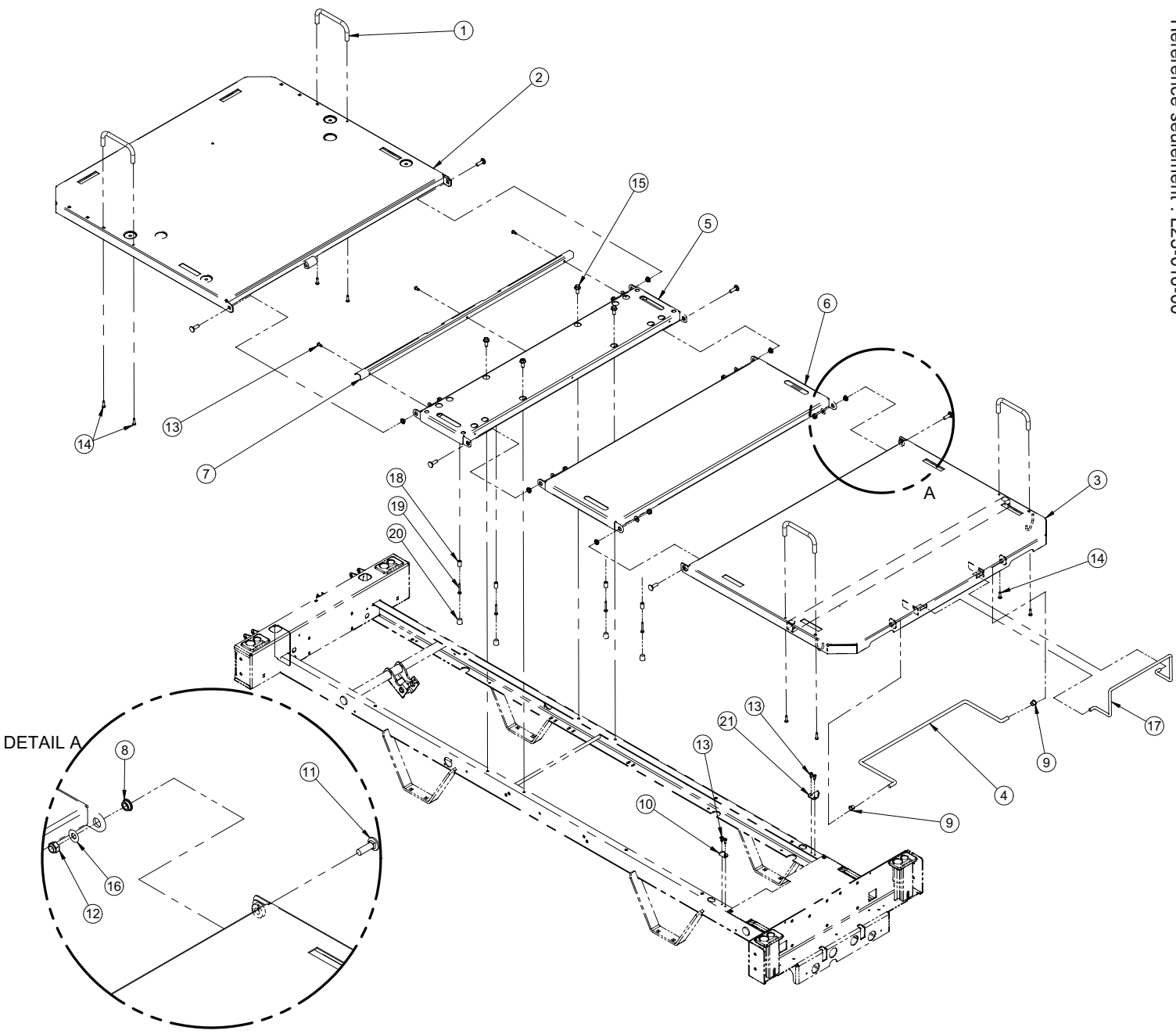


Sommiers - L23-016

Référence seulement : L23-016G-01


Item	Numéro de pièce	Description	Quantité
1	QP14034-07	Arrêt de matelas	4
2	23-0091G	S.A. Section de tête	1
3	23-0705G	Section de pied	1
4	23-0704G	Tige de soutien section de pied	1
5	23-0640G	S.A. Section de siège	1
6	25-0634G	Section de cuisse	1
7	25-0274G	Angle protecteur	1
8	QDF17-0020	Entretoise à épaulement diamètre 5/16 x 0.210"	6
9	QPNI2404	Coussinet en nylon avec épaulement diamètre interne 3/8"	2
10	28-0461Z	Crochet droit	1
11	VB35A1O32	Boulon à carrosserie petit cou 5/16-18-1 p.z. grade 5	6
12	VE20A1O	Écrou hexagone blocage nylon 5/16-18 p.z.	6
13	VV83A9G16	Vis taraudeuse tête pan Phillips type B #10 x 1/2" p.z.	7
14	VV83A9G24	Vis taraudeuse tête pan Phillips type B #10 x 3/4" p.z.	8
15	VVB4A1O24	Boulon 5/16"-18 x 3/4" filet roulant	4
16	VW10A10	Rondelle plate 5/16" SAE p.z.	6
17	17-0211G	Arrêt de matelas de pied	1
18	23-0368Z	Butée de section de centre	4
19	VV83A9G36	Vis type B #10 x 1-1/4"	4
20	QPCF1002	Embout de caoutchouc	4
21	28-0468Z	Crochet gauche	1

Levage tête et pied - L23-017

Référence seulement : L23-017-01

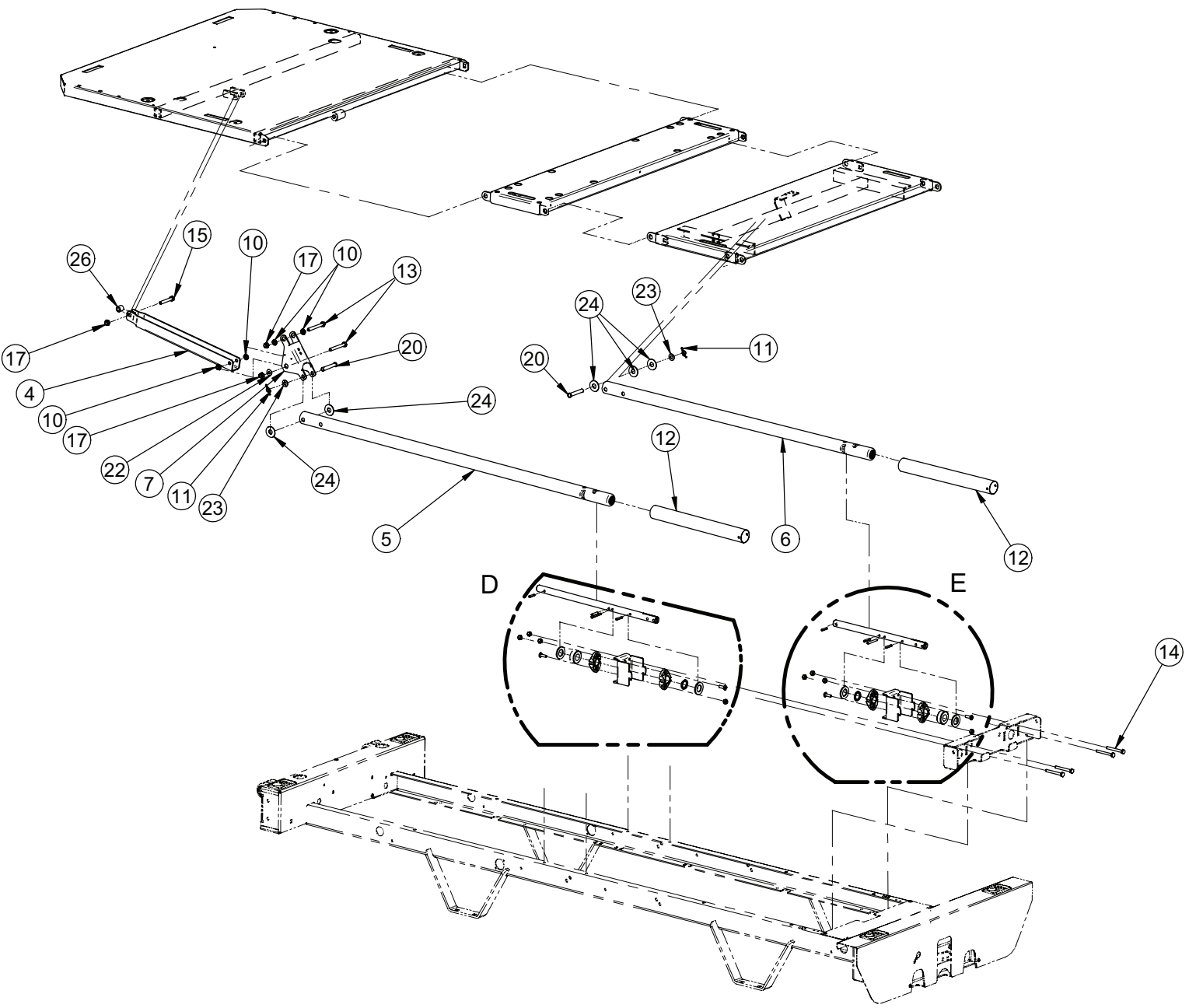

Levage tête et pied - L23-017

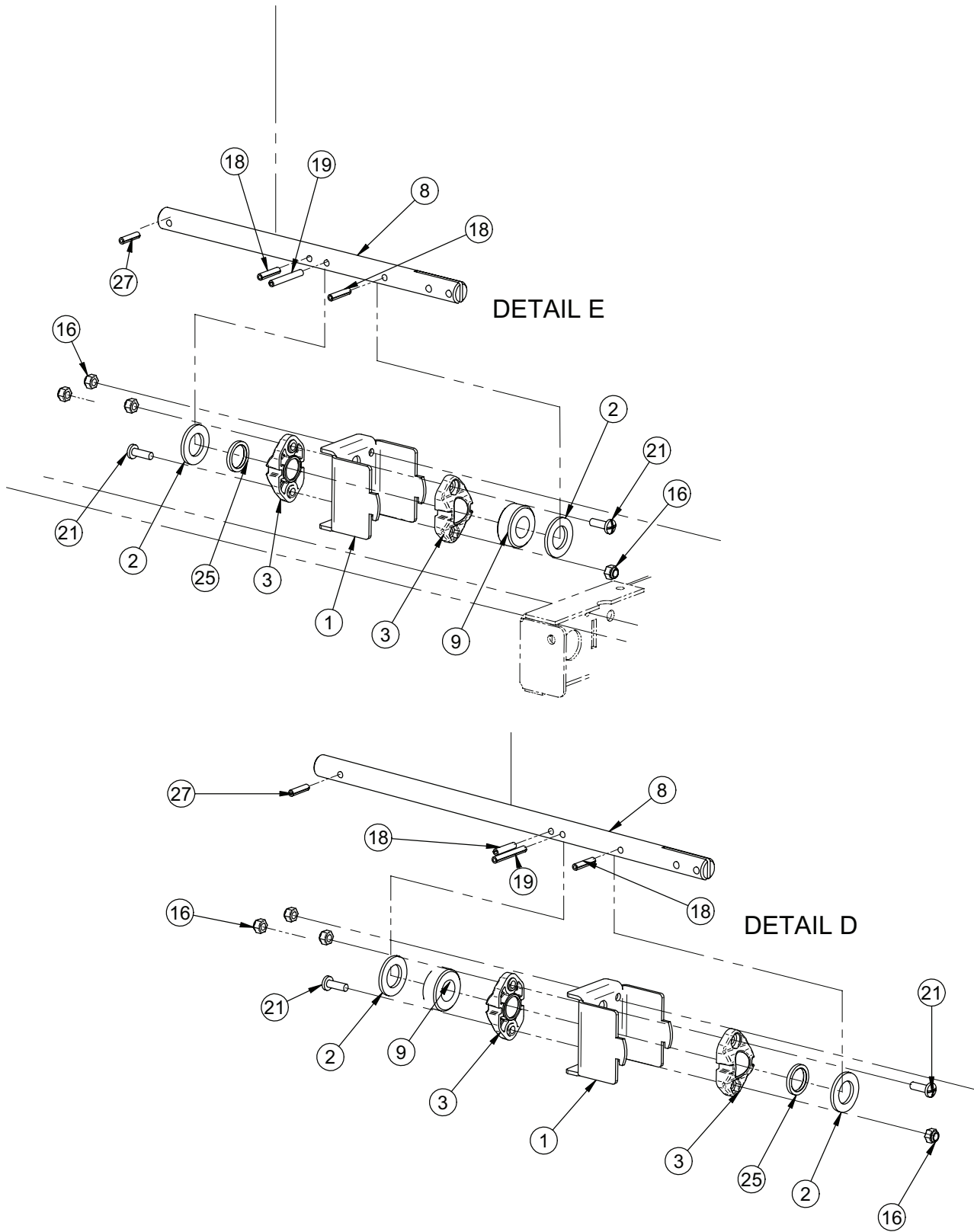

Levage tête et pied - L23-017


Référence seulement : L23-017G-02

Item	Part No.	Part Name	Qty.
1	13-0853G	Support de vis	2
2	13-0956Z	Rondelle pour boulon 3/4"	4
3	QP18-0248-01	Pivot pour vis de manivelle	4
4	20-0223G	Bras de levier section tête	1
5	23-0356	S.A. Tube vérin de tête - FL23M	1
6	23-0357	S.A. Tube vérin de cuisse - FL23M	1
7	25-0362Z	Levier de sommier	1
8	M0019	Graisse Petro Canada OG 2	0.0300
9	QB4459-00	Roulement 3/4"	2
10	QDF17-0020	Entretoise à épaulement diamètre 5/16 x 0.201"	4
11	QDF7878	Goupille à fermeture enroulante diamètre 3/8" p.z.	2
12	QDFT18-0254	Tube de protection de la vis	2
13	VB15A1O52	Boulon hexagone 5/16-18 x 2 1/2" grade 5 p.z.	2
14	VB15A1O50	Boulon hexagone 1/4-20 x 2 1/4" grade 5 p.z.	4
15	VB15A1O48	Boulon hexagone 5/16"-18 x 2" grade 5 p.z.	1
16	VE30A1N	Écrou hexagone blocage nylon 1/4-20 p.z.	8
17	VE30A1O	Écrou hexagone blocage nylon 5/16-18 p.z.	3
18	VG10B0732	Goupille à ressort 7/32" diamètre x 1" lg	4
19	VG10B0742	Goupille à ressort 7/32" diamètre x 1 5/8" lg	2
20	VG50B1250	Axe de chape diamètre 3/8" x 2 1/4" p.z.	2
21	VV33A1N24	Vis mécanique tête pan Phillips 1/4-20 x 3/4" p.z.	4
22	VW10A10	Rondelle plate 5/16" SAE p.z.	1
23	VW10C122402	Rondelle de nylon diamètre intérieur 3/8" x 1/16"	2
24	VW10C173602	Rondelle nylon diamètre intérieur 1/2" x 1 1/4" diamètre extérieur	5
25	VW10C263304	Rondelle nylon 13/16" diamètre intérieur x 1-1/16" extérieur x 1/8"	2
26	VW60C201320	Espaceur en nylon 5/8" x 0.386" x 39/64"	1
27	VG10B0728	Goupille à ressort 7/32" x 7/8" lg	2

[Retour à la table des matières](#)

Mécanisme de freinage sans 5^e roue - OL230042

Référence seulement : OL230042-04

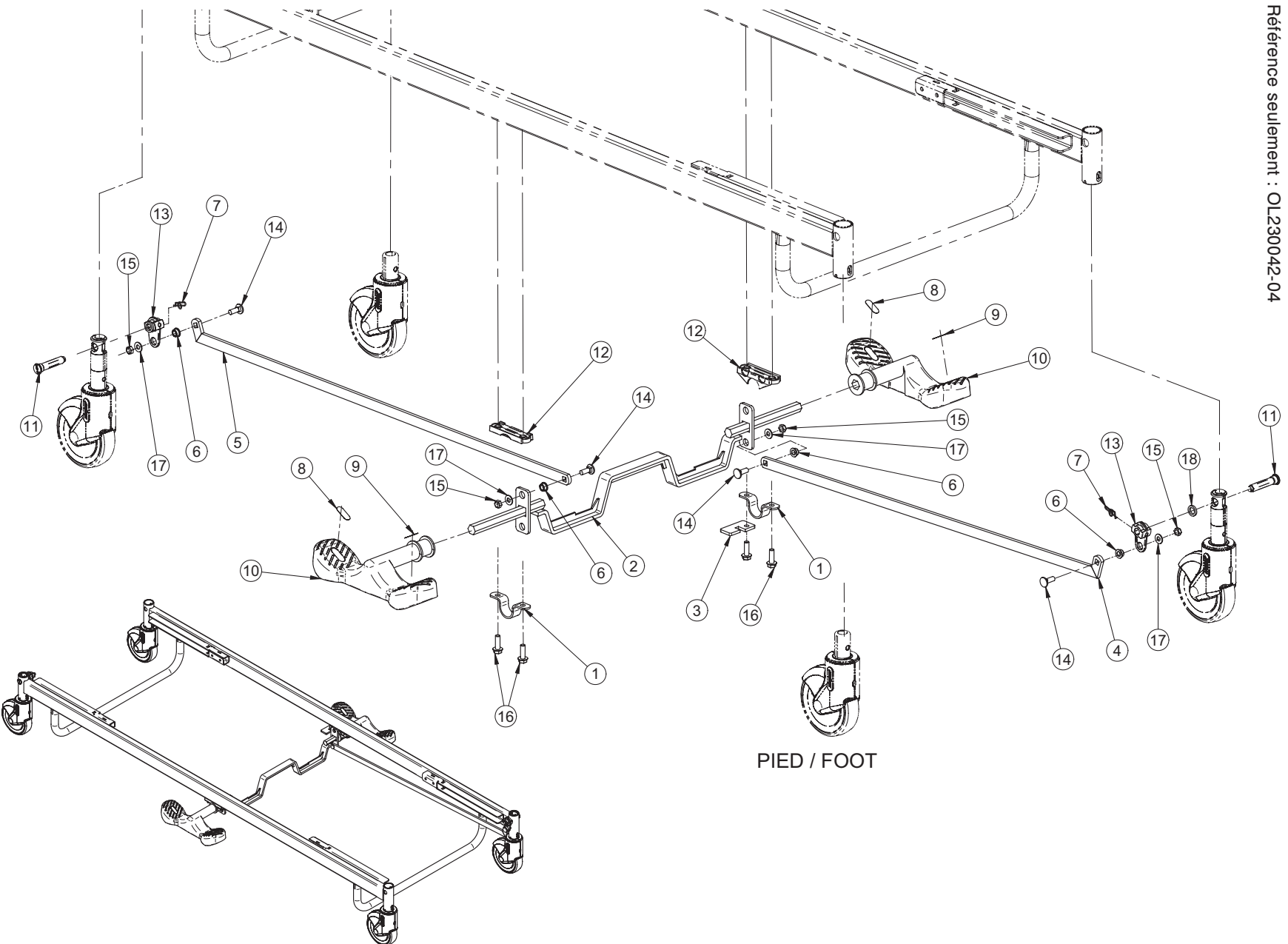

Retour à la table des matières

Mécanisme de freinage sans 5^e roue - OL230042


Référence seulement : OL230042G-03

Item	Numéro de pièce	Description	Quantité
1	14662Z	Bride d'attache	2
2	23-0327G	S.A. Axe de freinage	1
3	23-0333Z	Butée de freinage directionnelle	1
4	25-0291G	S.A. Barre de liaison - pied	1
5	25-0292G	S.A. Barre de liaison - tête	1
6	25-0340	Entretoise 5/16 x 3/16	4
7	QDF7878	Goupille à fermeture enroulante diamètre 3/8" p.z.	2
8	QE71-0496	Autocollant 5 ^e roue vert	2
9	QE71-0511	Autocollant frein	2
10	QP23-0627-11	Pédale	2
11	QPA23-0233	Axe de blocage	2
12	QPA25-0312	Entretoise moulée	2
13	QPA25-0411	Levier de freinage	2
14	VB35A1O28FT	Boulon de carrosserie 5/16-18 x 7-8" long cou grade 5 p.z.	4
15	VE79A1O	Écrou indesserrable 5/16-18 UNC Grade C	4
16	VVB4A1O32	Boulon 5/16"-18 x 1" filet roulant	4
17	VW10A10	Rondelle plate 5/16" SAE p.z.	4
18	VW10C162404	Rondelle nylon 1/2" intérieur x 3/4" extérieur x 1/8"	2

[Retour à la table des matières](#)

Mécanisme de freinage avec 5^e roue - OL230043

Référence seulement : OL230043

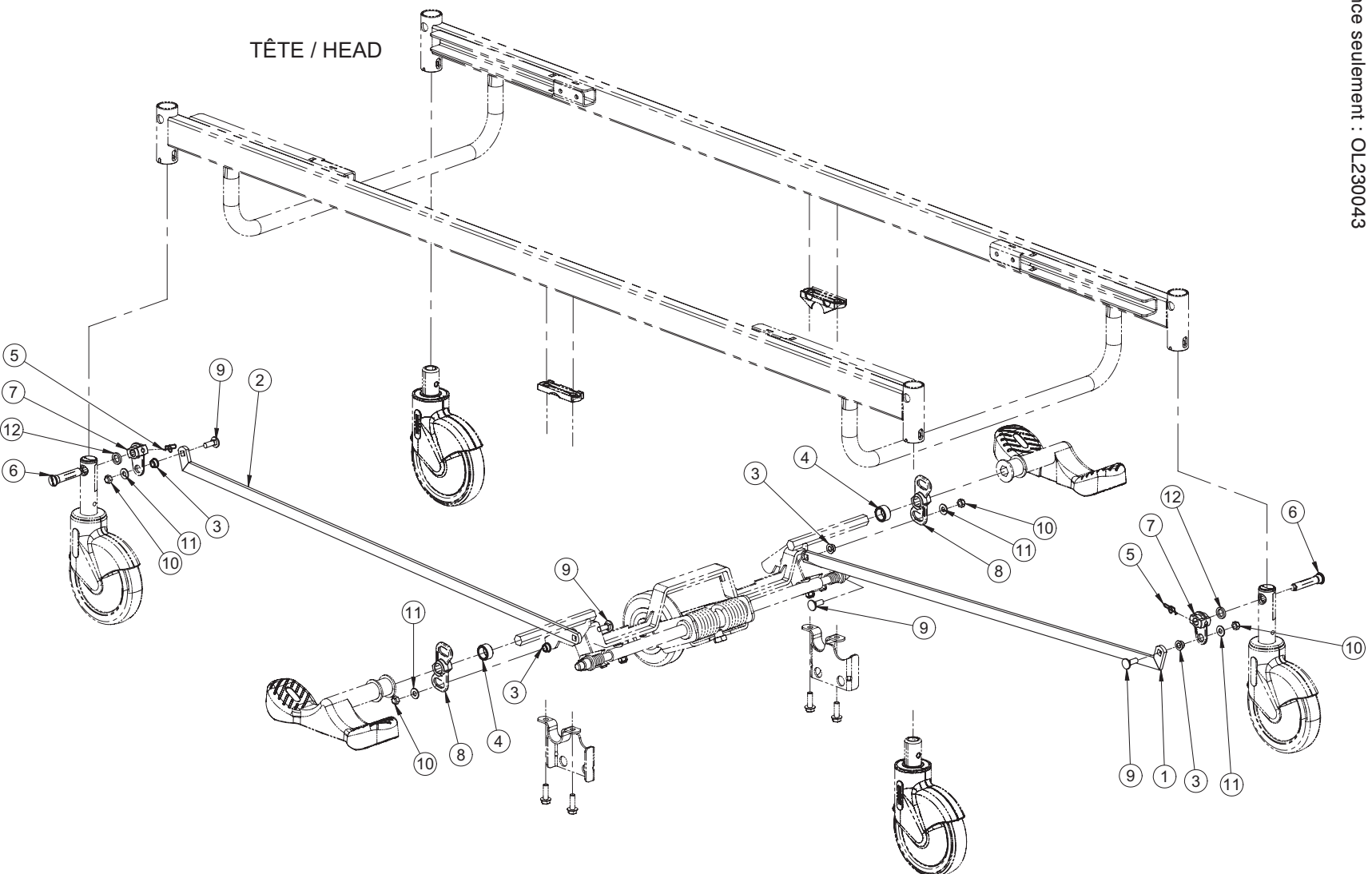


Mécanisme de freinage avec 5^e roue - OL230043

Référence seulement : OL230043G-02

Item	Numéro de pièce	Description	Quantité
1	25-0291G	S.A. Barre de liaison - pied	1
2	25-0292G	S.A. Barre de liaison - tête	1
3	25-0340	Entretoises 5/16 x 3/16	4
4	25-0451	Entretoise de levier	2
5	QDF7878	Goupille à fermeture enroulante diamètre 3/8" p.z.	2
6	QPA23-0233	Axe de blocage	2
7	QPA25-0411	Levier de freinage	2
8	QPA25-0427	Levier de blocage	2
9	VB35A1O28FT	Boulon de carrosserie 5/16-18 x 7-8" long cou grade 5 p.z.	4
10	VE79A1O	Écrou indesserrable 5/16-18 UNC grade C	4
11	VW10A10	Rondelle plate 5/16" SAE p.z.	4
12	VW10C162404	Rondelle nylon 1/2" intérieur x 3/4" extérieur x 1/8"	2

Roulettes 6" sans 5^e roue - OL230048

Référence seulement : OL230048-04

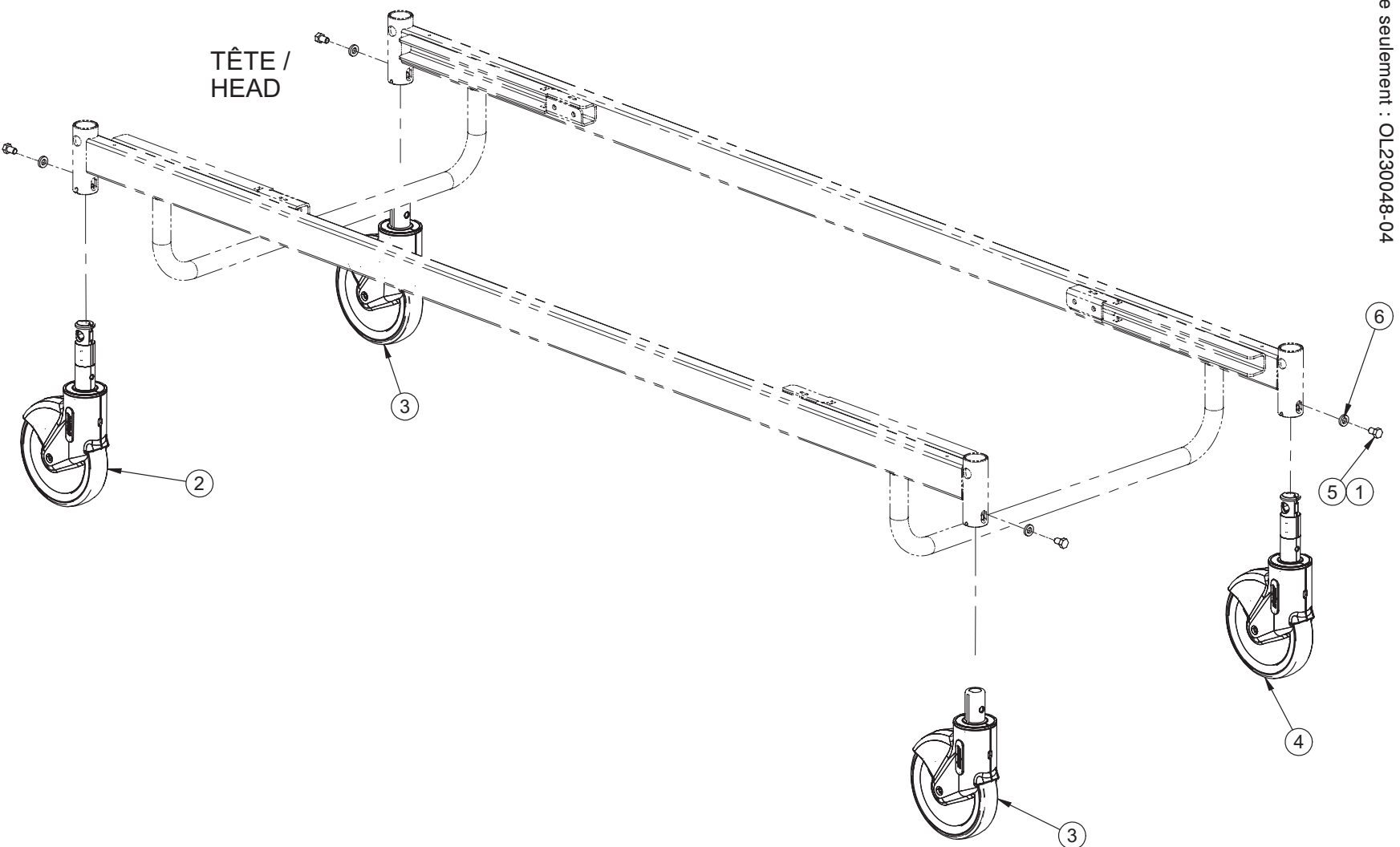

Retour à la table des matières


Roulettes 6" sans 5^e roue - OL230048

Référence seulement : OL230048-04

Item	Numéro de pièce	Description	Quantité
1	M0008	Ciment à filets - force moyenne (bleu)	0.0500
2	RD25038807	Roulette de 6" avec frein	1
3	RD25049307	Roulette de 6" pivotante	2
4	RD25049607	Roulette de 6" directionnelle	1
5	VB15A1O16	Boulon hexagone 5/16-18 x 1/2" grade 5 p.z.	4
6	VW10A1120	Rondelle plate diamètre 5/16"	4

Roulettes 6" avec 5^e roue - OL230050

Référence seulement : OL230050-03

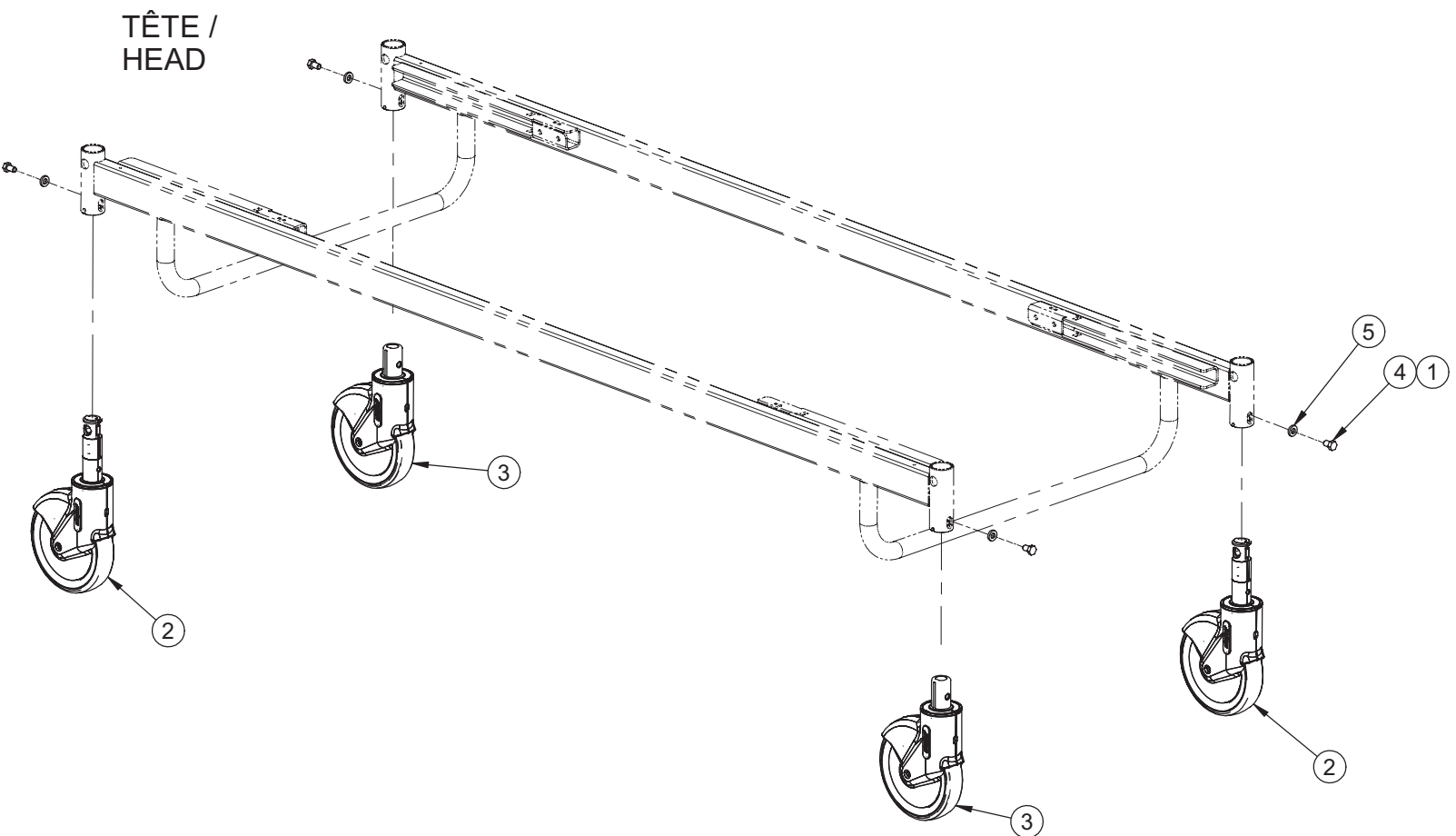


Roulettes 6" avec 5^e roue - OL230050

Référence seulement : OL230050-05

Item	Numéro de pièce	Description	Quantité
1	M0008	Ciment à filets - force moyenne (bleu)	0.0500
2	RD25038807	Roulette de 6" avec frein	2
3	RD25049307	Roulette de 6" pivotante	2
4	VB15A1O16	Boulon hexagone 5/16-18 x 1/2" grade 5 p.z.	4
5	VW10A1120	Rondelle plate diamètre 5/16"	4

Pare-chocs - une roulette rigide - OL230052

Référence seulement : OL230052-01

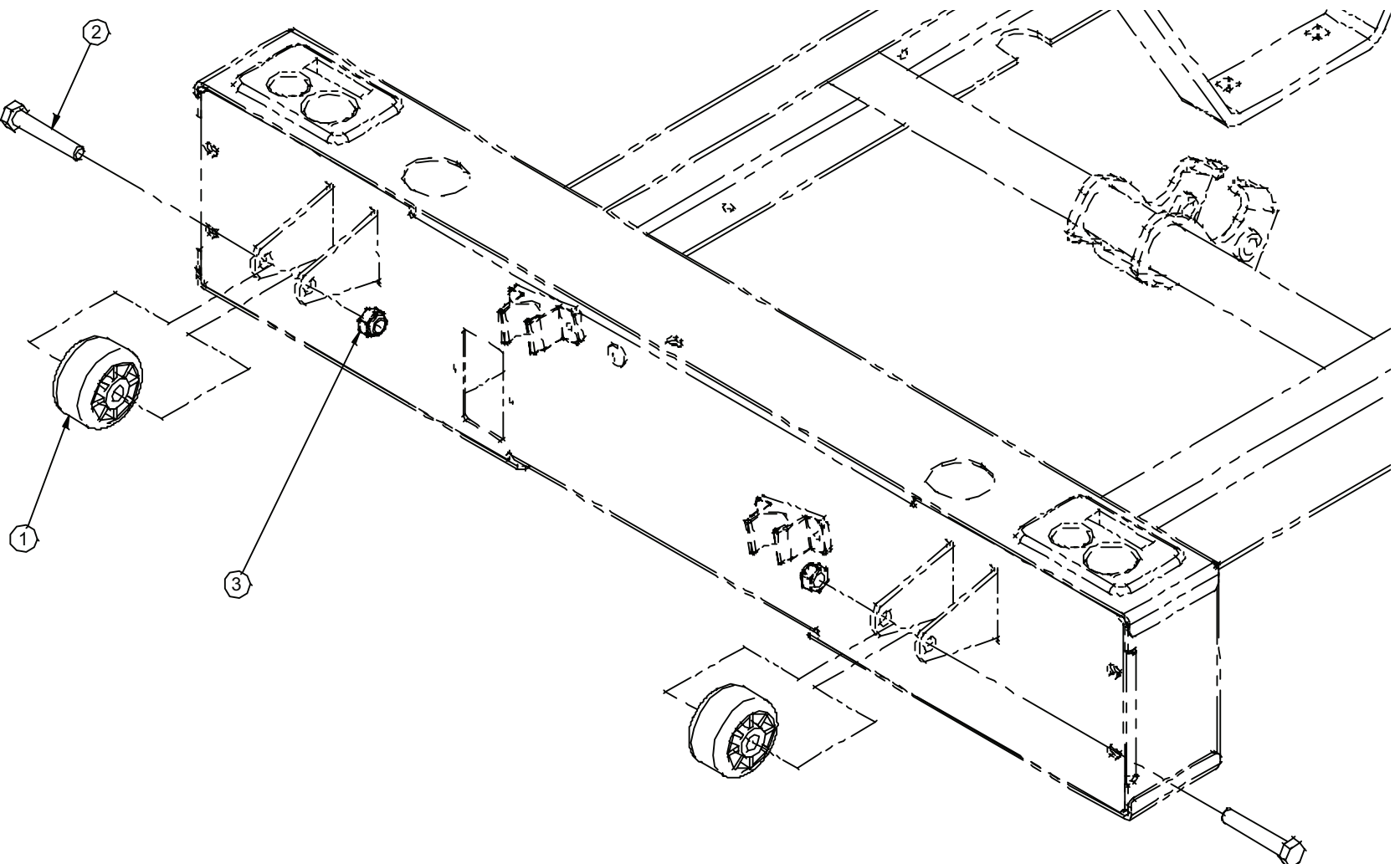

Retour à la table des matières


Pare-chocs - une roulette rigide - OL230052

Référence seulement : OL230052G-03

Item	Numéro de pièce	Description	Quantité
1	QPN-14-0705	Roulette	2
2	VB15A1O44	Boulon hexagone 5/16-18 x 1 3/4" grade 5 p.z.	2
3	VE30A1O	Écrou hexagone blocage nylon 5/16-18 p.z.	2

Pare-chocs - deux roulettes souples - OL230053

Référence seulement : OL230053-00

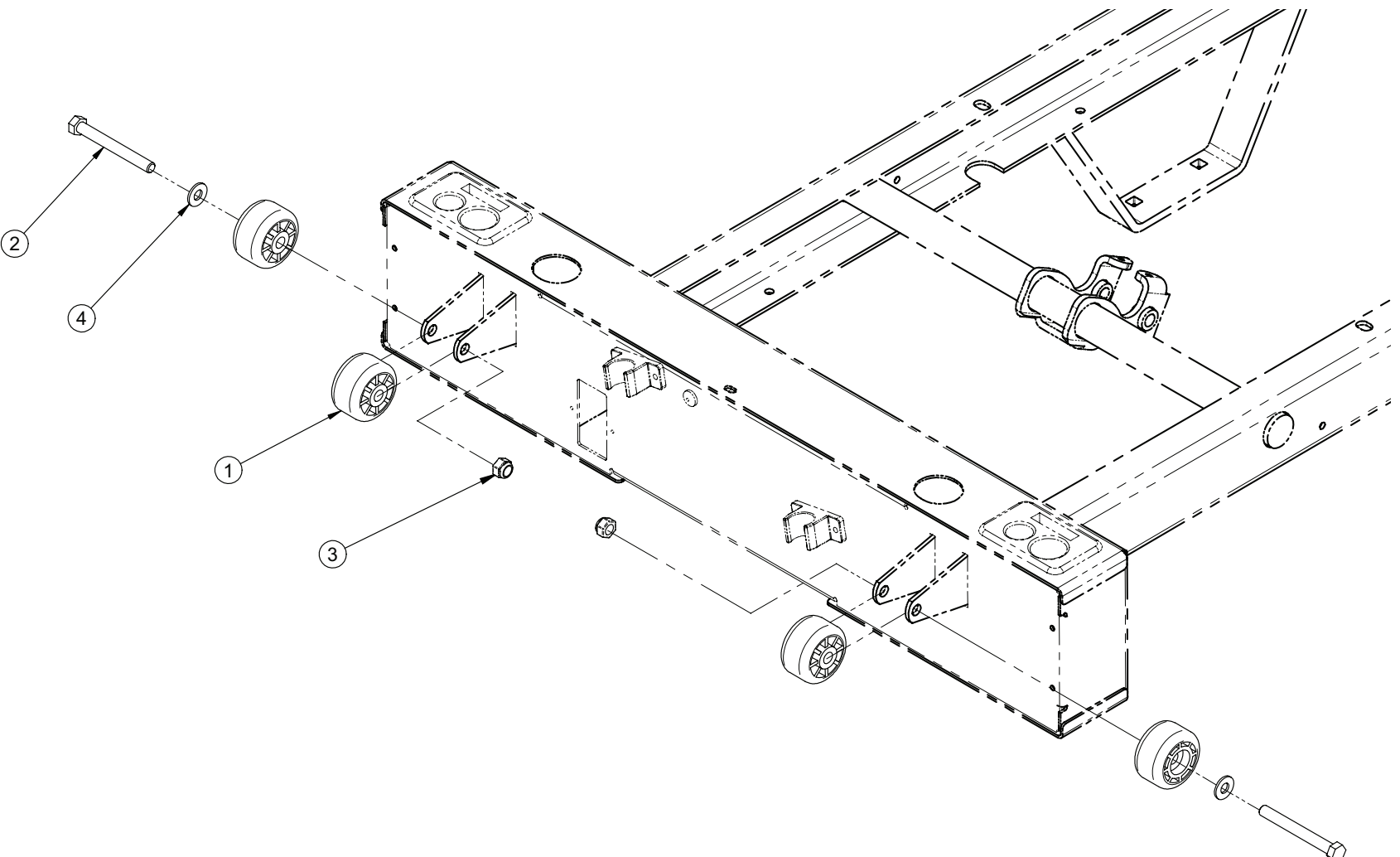

Retour à la table des matières

Pare-chocs - deux roulettes souples - OL230053


Référence seulement : OL230053G-02

Item	Numéro de pièce	Description	Quantité
1	QPC-14-0321	Roulette de pare-chocs diamètre 1 3/4"	4
2	VB15A1O54	Boulon hexagone 5/16-18 unc x 2 3/4" lg grade 5 p.z.	2
3	VE30A1O	Écrou hexagone blocage nylon 5/16-18 p.z.	2
4	VW10A10	Rondelle plate 5/16" SAE p.z.	2

[Retour à la table des matières](#)

Pare-chocs réglables - OL230054

Référence seulement : OL230054

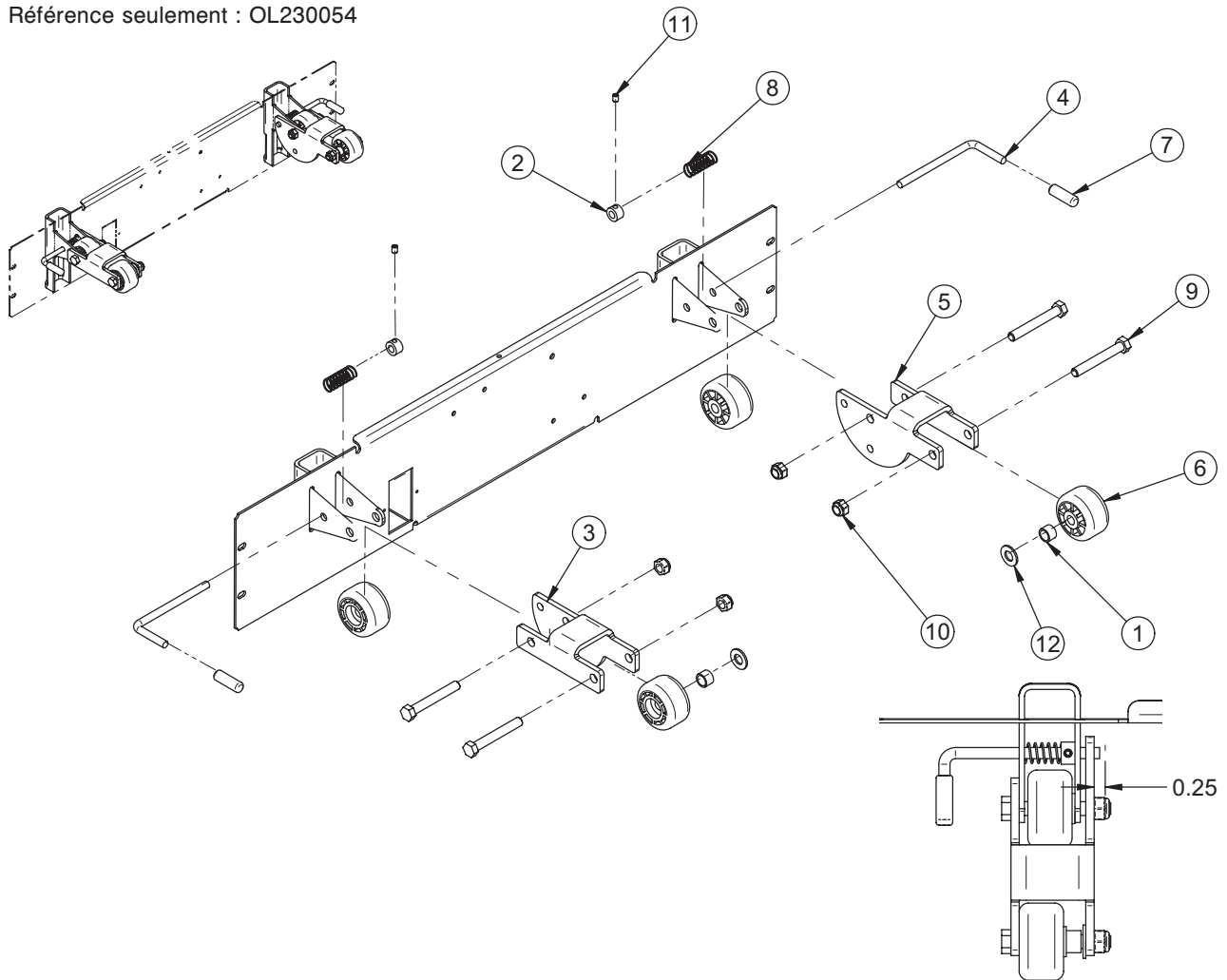


Référence seulement : OL230054G-03

Item	Numéro de pièce	Description	Quantité
1	14403Z	Espaceur	2
2	19-0478Z	Butée réglable	2
3	23-0347G	Plaque pivotante	1
4	23-0348Z	Verrou	2
5	23-0349G	Plaque pivotante droite	1
6	QPN-14-0705	Roulette	4
7	QPVA0012	Capuchon vinyl diamètre 1/4" x 1 1/4"	2
8	QRC18642	Ressort du déclencheur p.z.	2
9	VB15A1O50	Boulon hexagone 5/16-18 x 2 1/4" grade 5 p.z.	4
10	VE30A1O	Écrou hexagone blocage nylon 5/16-18 p.z.	4
11	VV60A0G08-S	Vis pression six pans creux 10-32 x 1/4" Scotch Grip	2
12	VW10C122402	Rondelle de nylon 3/8" diamètre intérieur x 1/16"	2

Couvercles de roue - OL230101

Référence seulement : OL230101-02

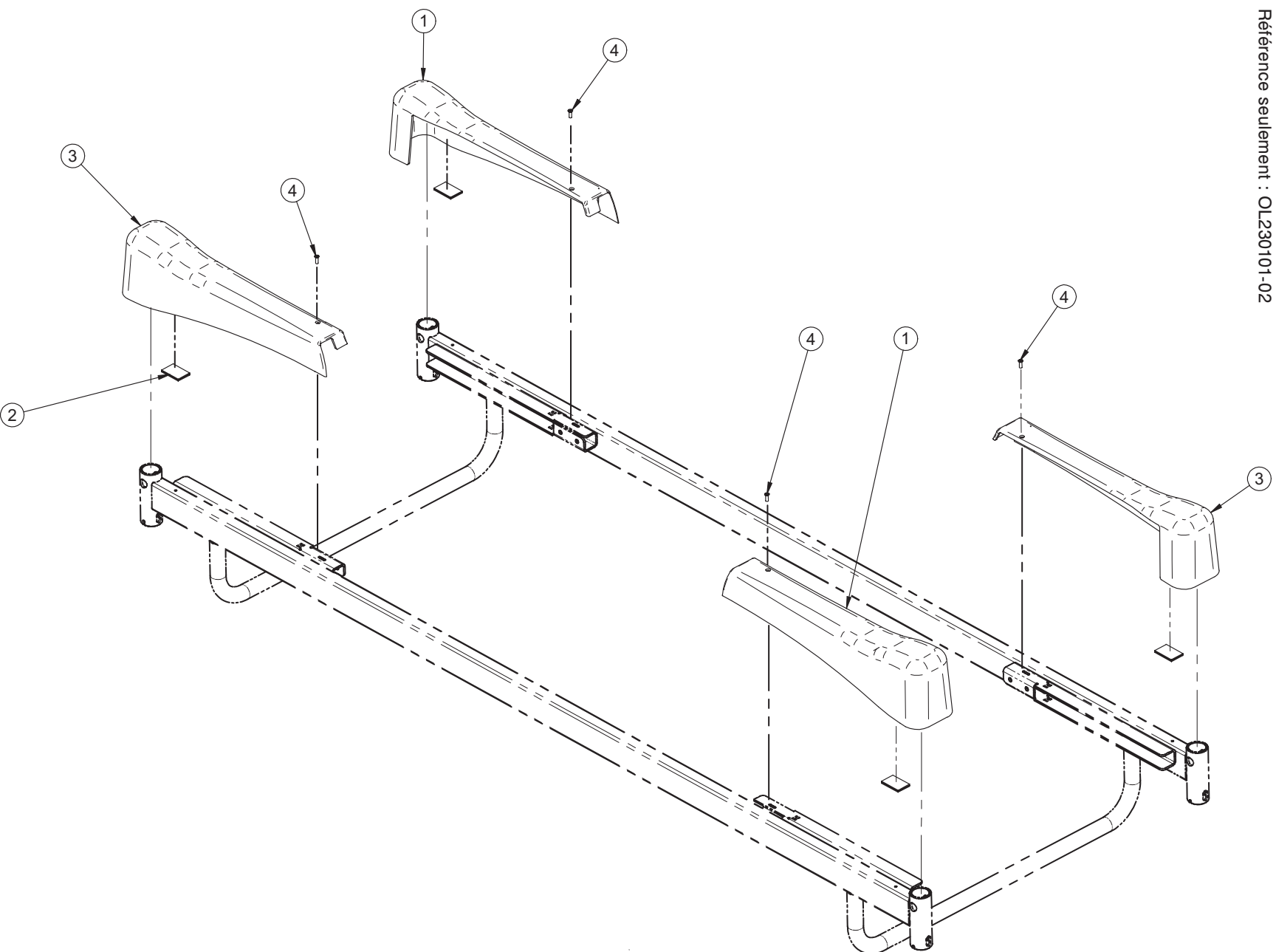

[Retour à la table des matières](#)


Couvercles de roue - OL230101

Référence seulement : OL230101-03

Item	Numéro de pièce	Description	Quantité
1	QP28-0299-07	Couvercle du capot de roulette droit	2
2	25-0550	Velcro du capot de roulette	4
3	QP28-0300-07	Couvercle du capot de roulette gauche	2
4	VV81A9E16	Vis taraudeuse type B tête plate Phillips #8 x 1/2" p.z.	4

Manivelles fixes - OL230161

Référence seulement : OL230161-04

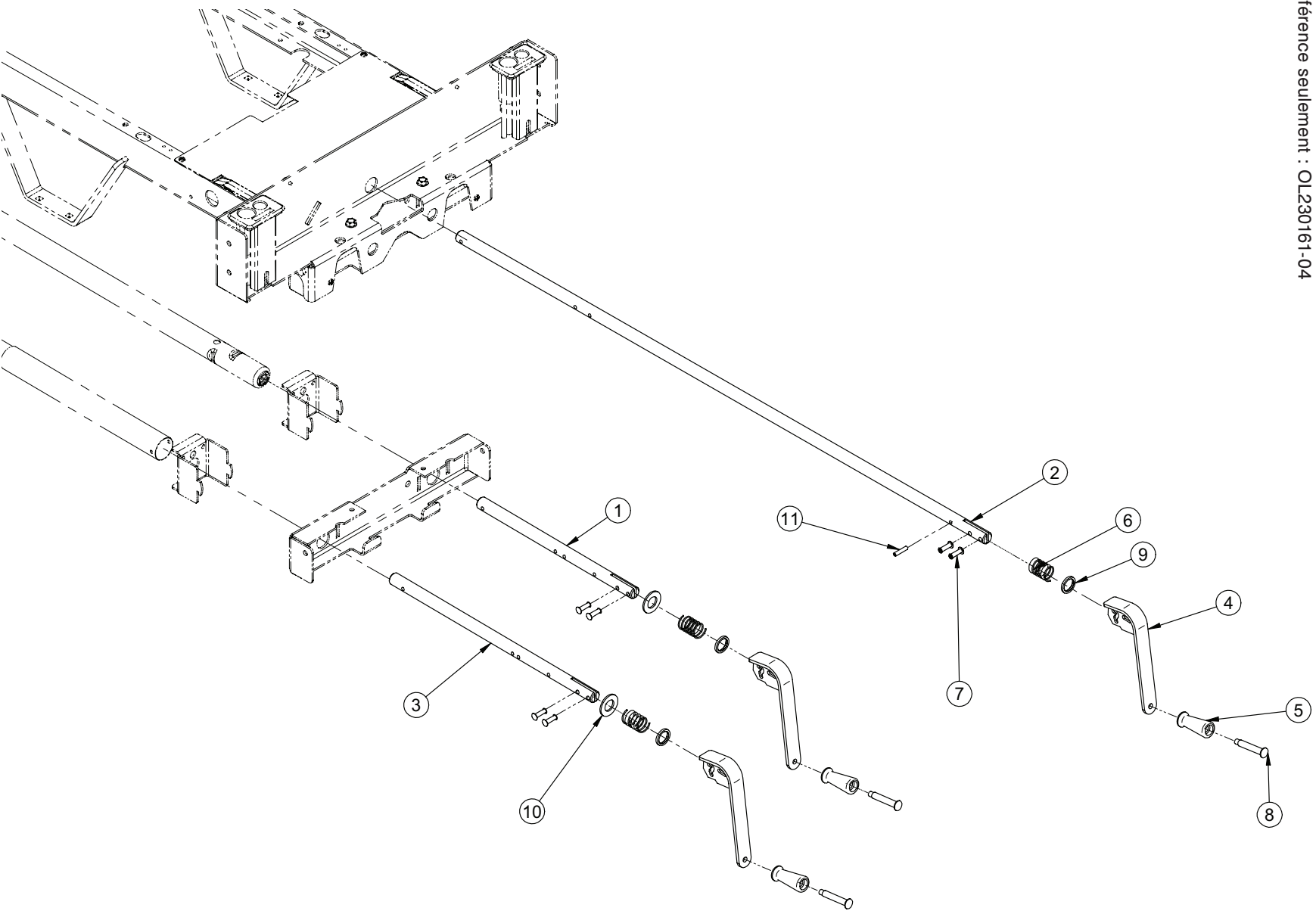


Manivelles fixes - OL230161

Référence seulement : OL230161-03

Item	Numéro de pièce	Description	Quantité
1	23-0694Z	Vis de vérin de pied (manivelle fixe)	1
2	23-0373Z	Vis de pied du mécanisme d'élévation	1
3	23-0455Z	Vis de la section de tête	1
4	40060C	S.A. Manivelle chromée	3
5	QPN-9438	Poignée de nylon noir	3
6	QRC18134	Ressort de compression 13/16" x 1-7/16" lg x 0.065"	3
7	VR23A0828	Rivet tubulaire 1/4" x 7/8" p.z.	6
8	VR43A9439	Rivet à épaulement	3
9	VW10C263304	Rondelle nylon 13/16" intérieur x 1 1/16" extérieur x 1/8"	3
10	VW10C392403	Rondelle nylon 0.760" x 1.420" x 0.100"	2
11	VG10B0732	Goupille à ressort 7/32" diamètre x 1" lg	1

Manivelle amovible - OL230162

Référence seulement : OL230162-03

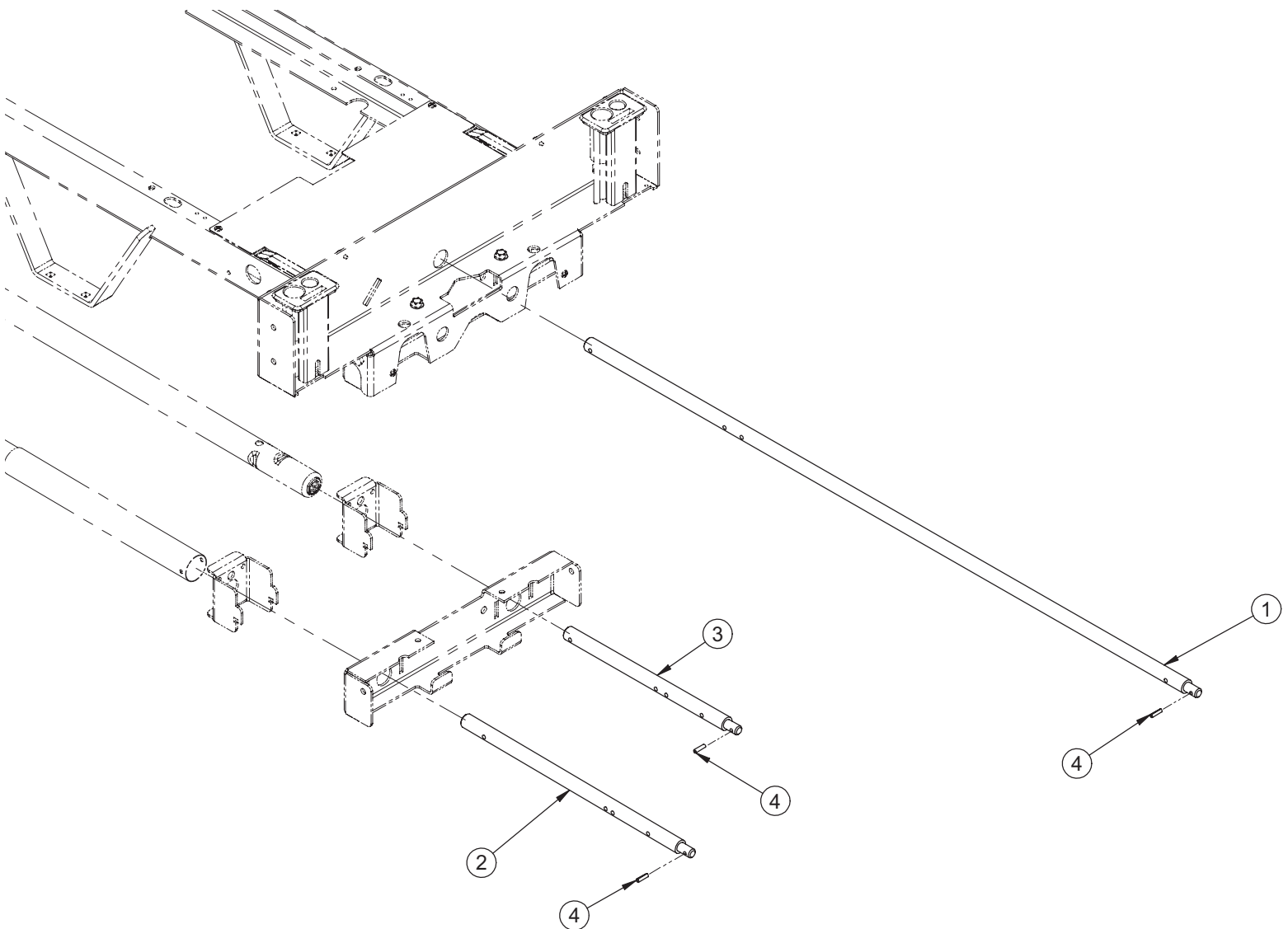


Manivelle amovible - OL230162

Référence seulement : OL230162-02

Item	Numéro de pièce	Description	Quantité
1	23-0457Z	Vis de pied du mécanisme d'élévation - manivelle amovible	1
2	23-0458Z	Vis de la section de tête - manivelle amovible	1
3	23-0459Z	Vis de la section de cuisse - manivelle amovible	1
4	VG10B0622	Goupille ressort 3/16" diamètre x 11/16" lg	3

Lit sur pattes 6" - OL230163

Référence seulement : OL230163-02

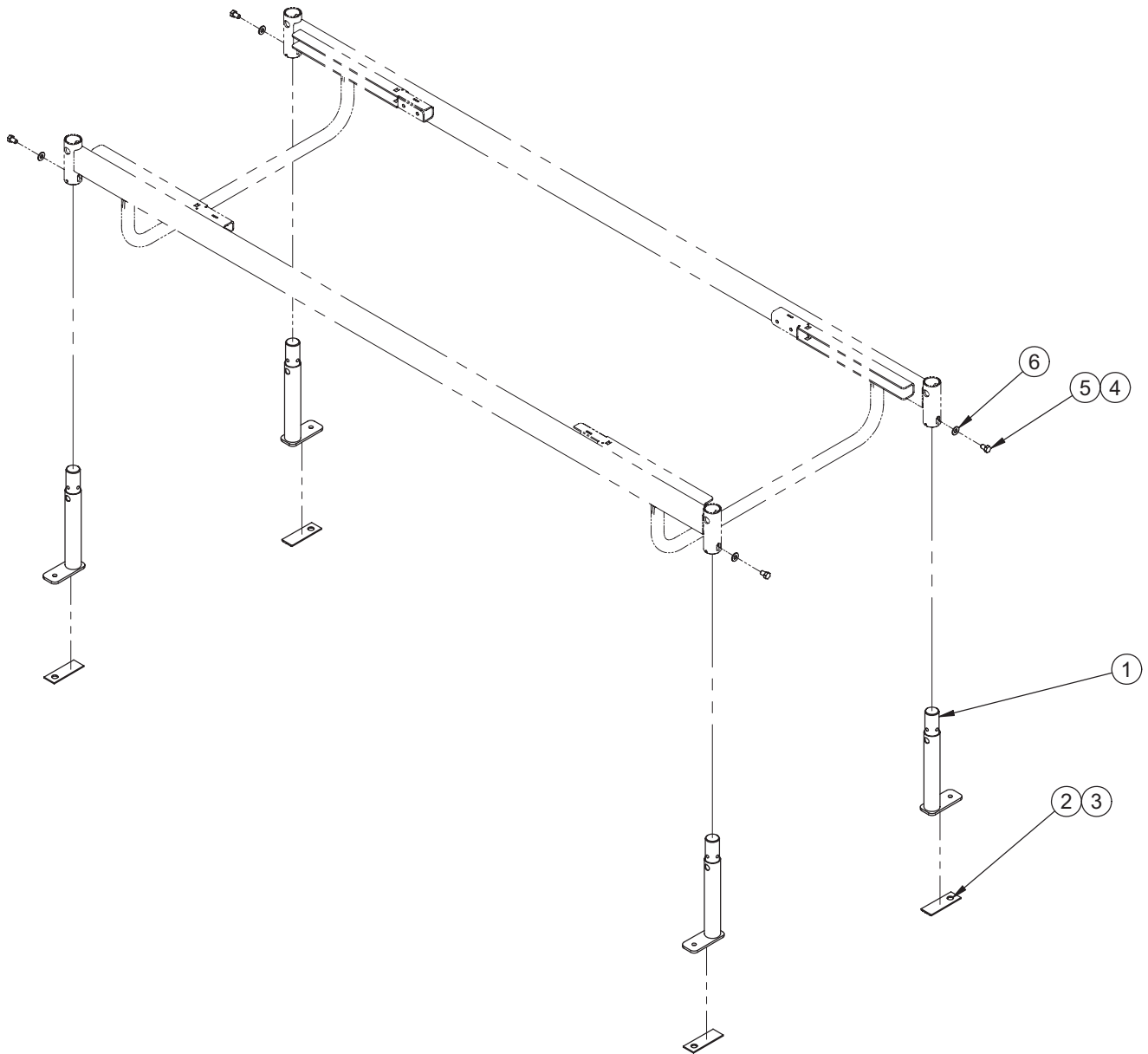


Référence seulement : OL230163G-02

Item	Numéro de pièce	Description	Quantité
1	23-0748G	S.A. Patte de fixation	4
2	23-0462	Semelle de retenue	4
3	M0005	Colle cyanoacrylate #TB1743-1	0.0150
4	M0008	Ciment à filets - force moyenne (bleu)	0.1500
5	VB15A1O16	Boulon hexagone 5/16-18 x 1/2" grade 5 p.z.	4
6	VW10A10	Rondelle plate 5/16" SAE p.z.	4

[Retour à la table des matières](#)


Autocollants FL23M - anglais seulement - OL230164

Référence seulement : OL230164-00

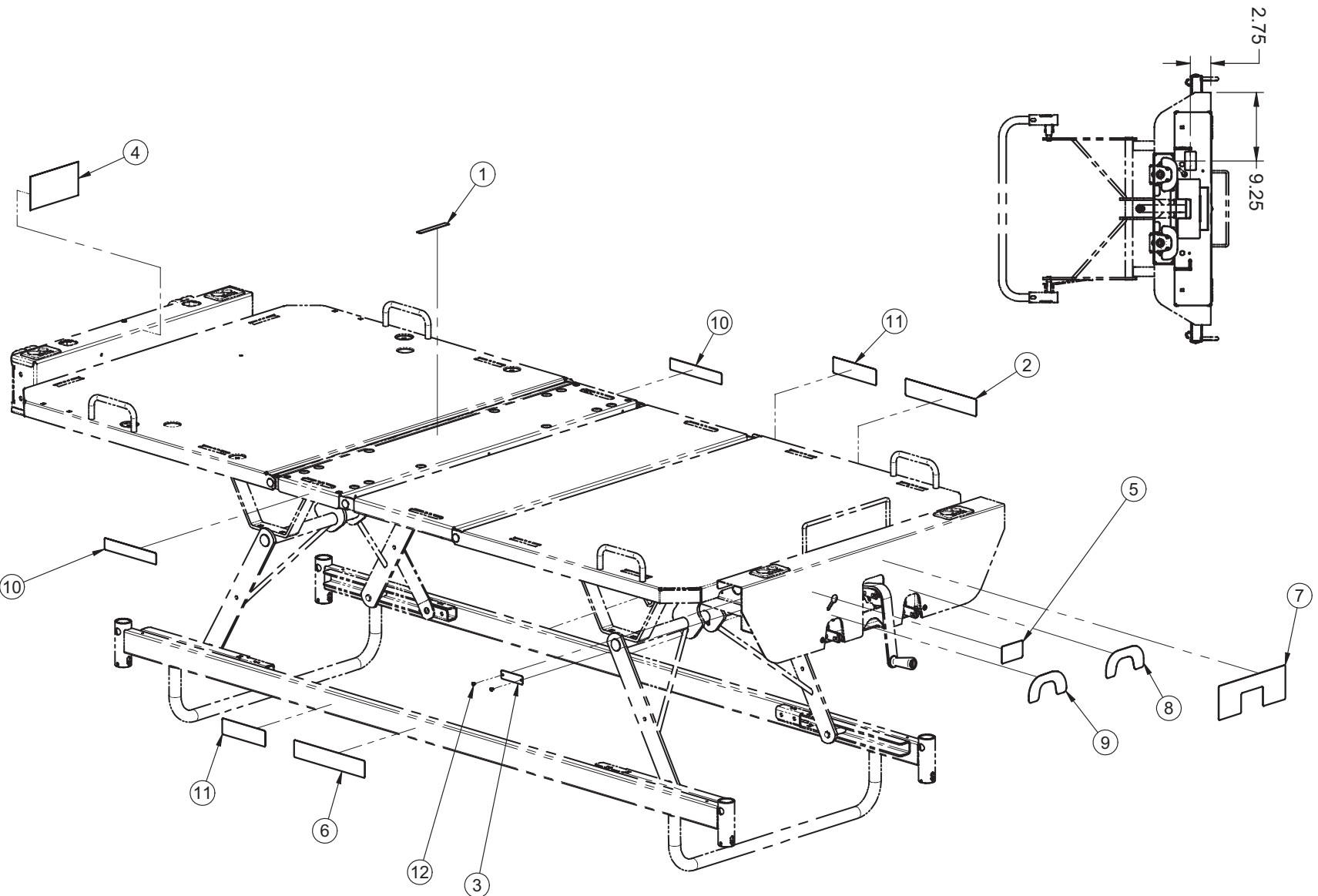

Retour à la table des matières

Autocollants FL23M - anglais seulement - OL230164

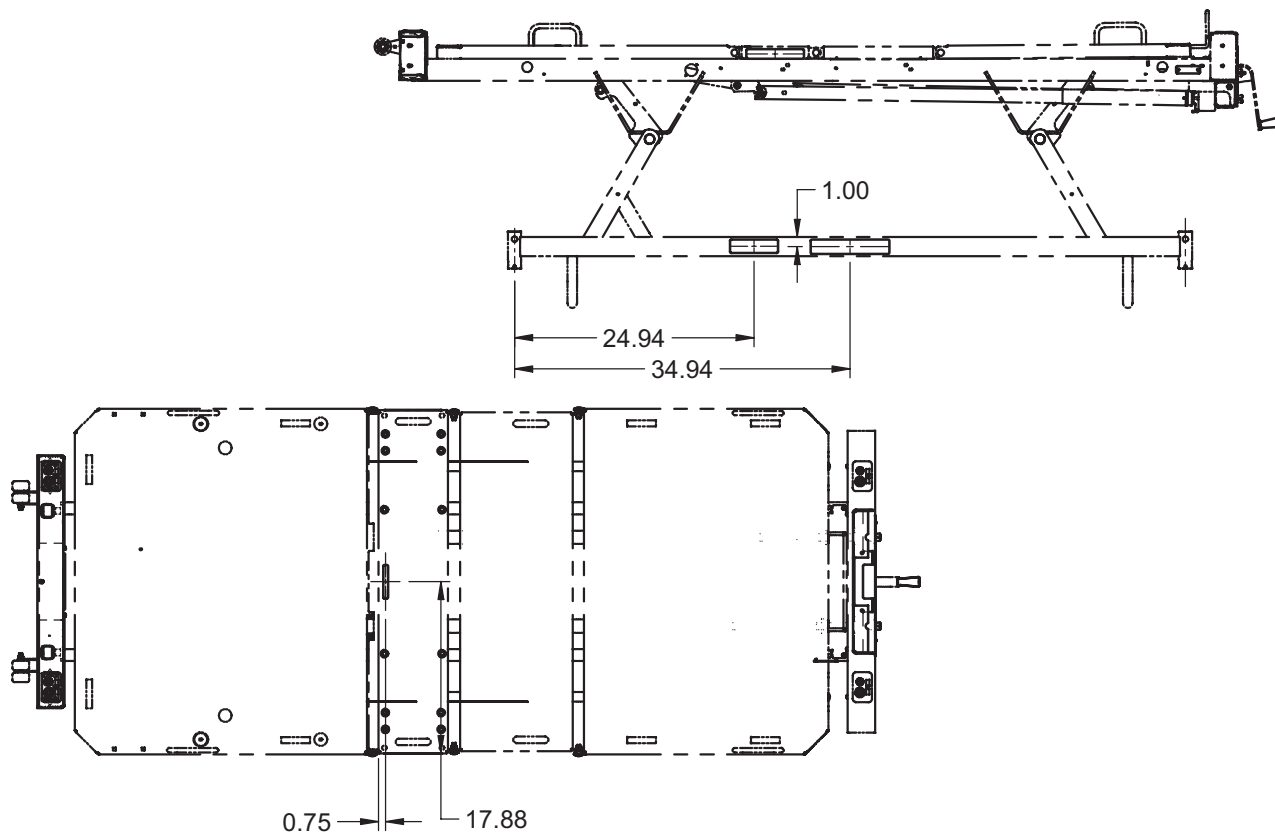


Référence seulement : OL230164-01

Item	Numéro de pièce	Description	Quantité
1	QE71-0709-E	Autocollant - Épaisseur maximum du matelas	1
2	QE71-0722-E	Autocollant - Positions de la pédale gauche	1
3	QE71-0821-T	Plaque du numéro de série	1
4	QE71-0861-F	Autocollant manufacturier	1
5	QE71-0856-F	Autocollant - Utilisation des manivelles	1
6	QE71-0721-E	Autocollant - Positions de la pédale droite	1
7	QE71-0843	Autocollant - Fonctionnement du Trend	1
8	QE71-0840	Autocollant - Mouvement de la section de cuisse	1
9	QE71-0839	Autocollant - Mouvement de la section tête	1
10	QE71-0547	Autocollant - Charge maximum	2
11	QE71-0346	Autocollant - STRYKER	2
12	VR11H43	Rivet "POP" #43 tête dôme	2

[Retour à la table des matières](#)

Vis de blocage de panneau - OL230165

Référence seulement : OL230165-02

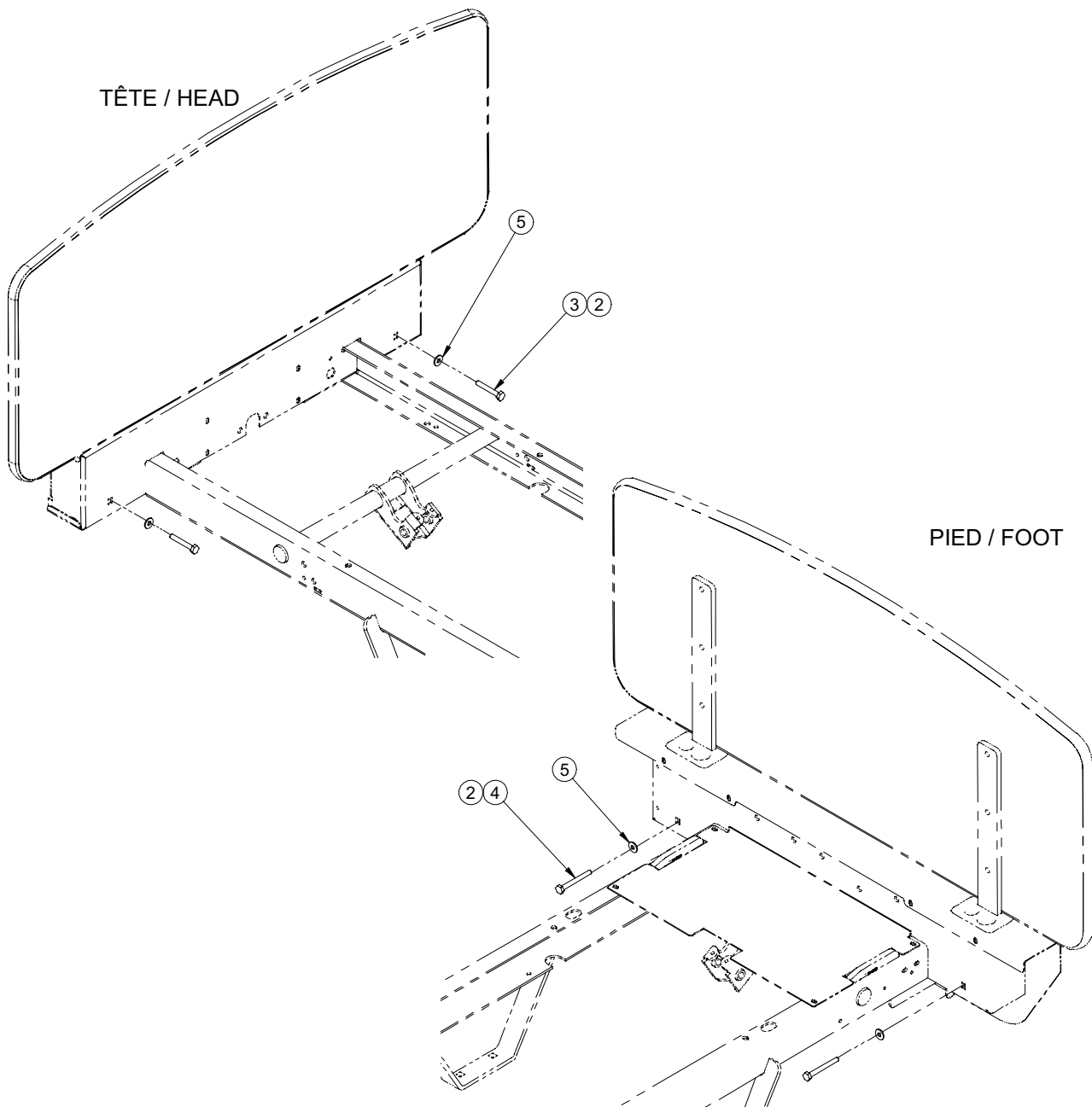


Référence seulement : OL230165-01

Item	Numéro de pièce	Description	Quantité
1	ED2043	Sac de plastique 3/5 refermable "mini-grip"	1
2	M0028	Ciment à filets de force moyenne	1
3	VB15A1N44	Boulon hexagone 1/4" 20 UNC x 1 3/4", grade 5	2
4	VB15A1N50	Boulon hexagone 1/4-20 x 2 1/4" grade 5 p.z.	2
5	VW10A08	Rondelle plate 1/4" SAE p.z.	4

[Retour à la table des matières](#)


Autocollants FL23M - anglais/espagnol - OL230184

Référence seulement : OL230184-00

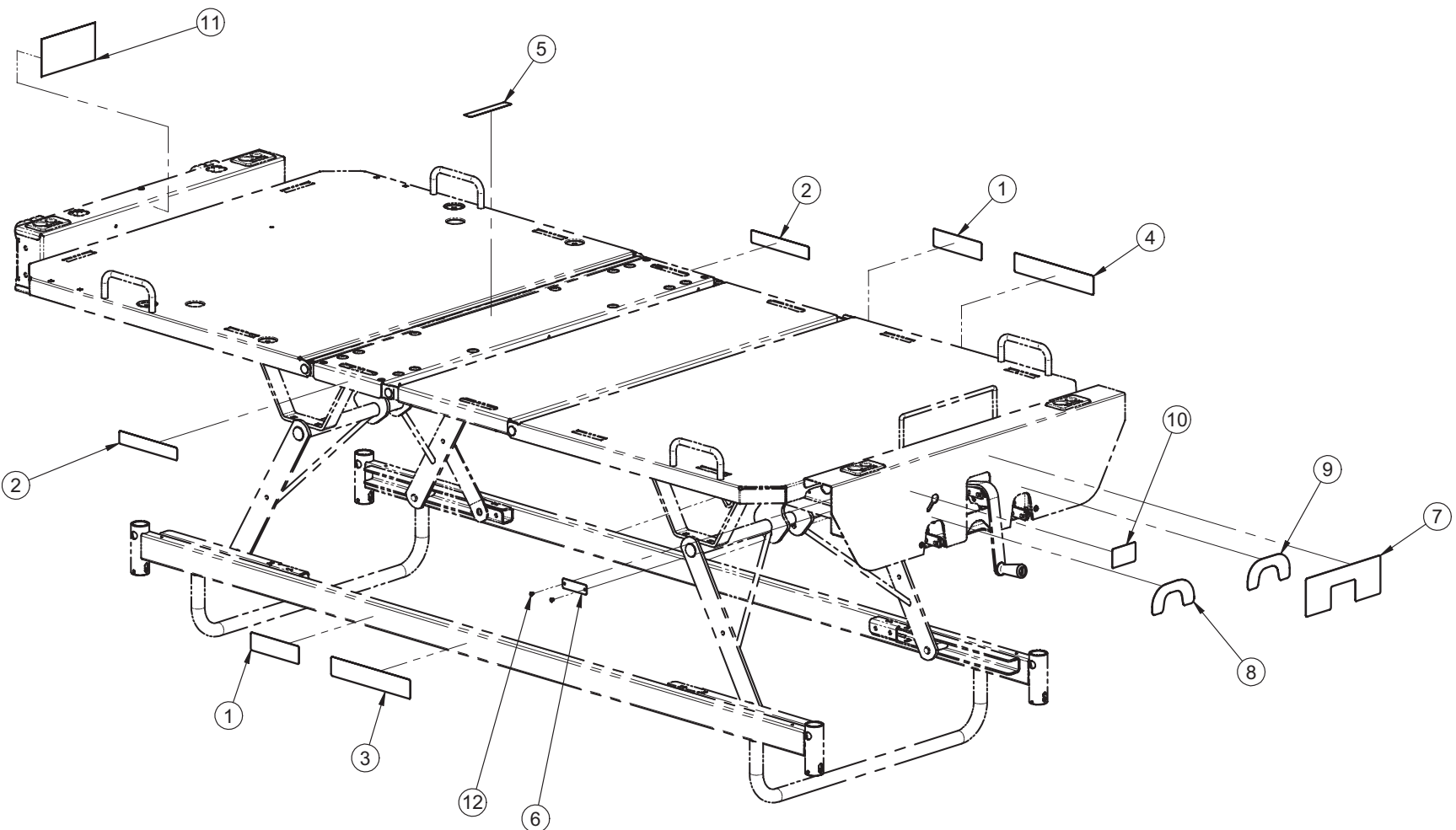

Retour à la table des matières

Autocollants FL23M - anglais/espagnol - OL230184

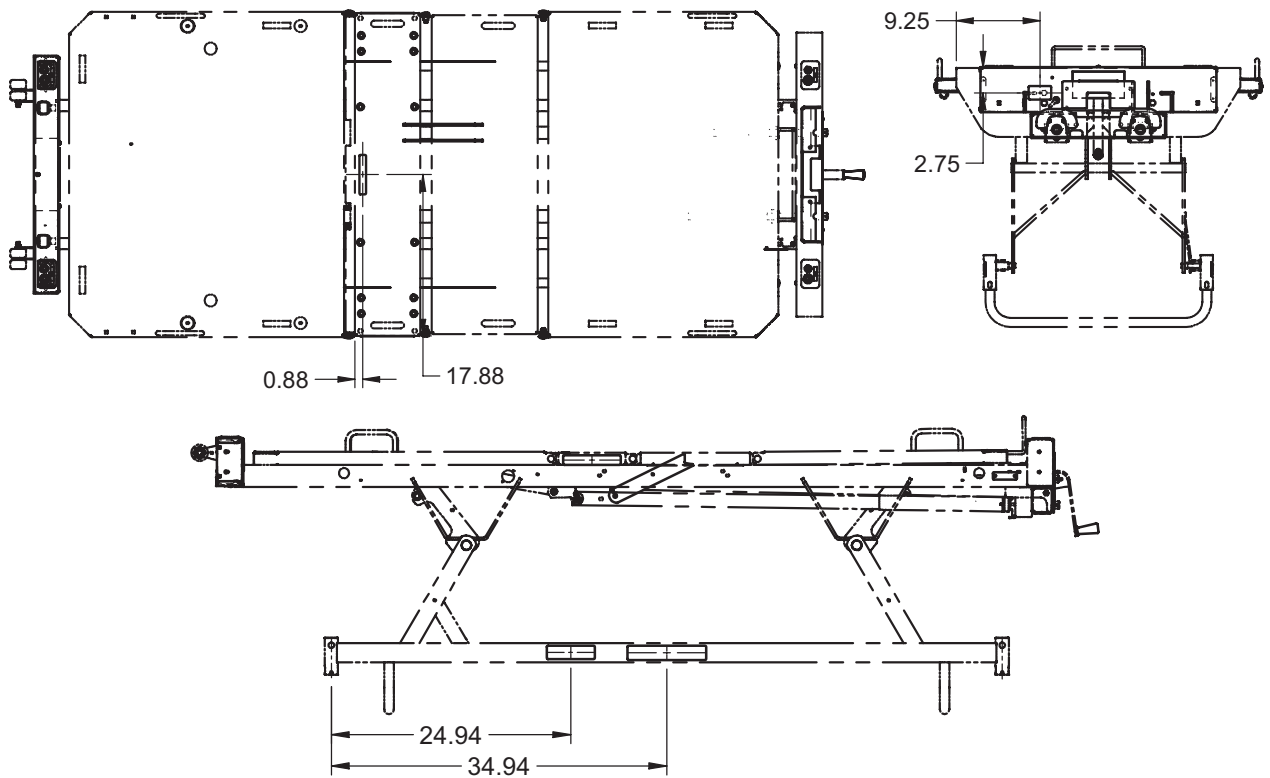


Référence seulement : OL230184-02




Item	Numéro de pièce	Description	Quantité
1	QE71-0346	Autocollant - STRYKER	2
2	QE71-0547	Autocollant - Charge maximum	2
3	QE71-0739-T	Autocollant - Positions de la pédale droite	1
4	QE71-0740-T	Autocollant - Positions de la pédale gauche	1
5	QE71-0741-T	Autocollant - Épaisseur maximum du matelas	1
6	QE71-0821-T	Plaque du numéro de série	1
7	QE71-0838-T	Autocollant - Fonctionnement du Trend	1
8	QE71-0841-E	Autocollant - Mouvement de la section de tête	1
9	QE71-0842-E	Autocollant - Mouvement de la section de cuisse	1
10	QE71-0856-F	Autocollant - Utilisation des manivelles	1
11	QE71-0861-F	Autocollant manufacturier	1
12	VR11H43	Rivet "POP" #43 tête dôme	2

Autocollants FL23M - français/anglais - OL230185

Référence seulement : OL230185-01

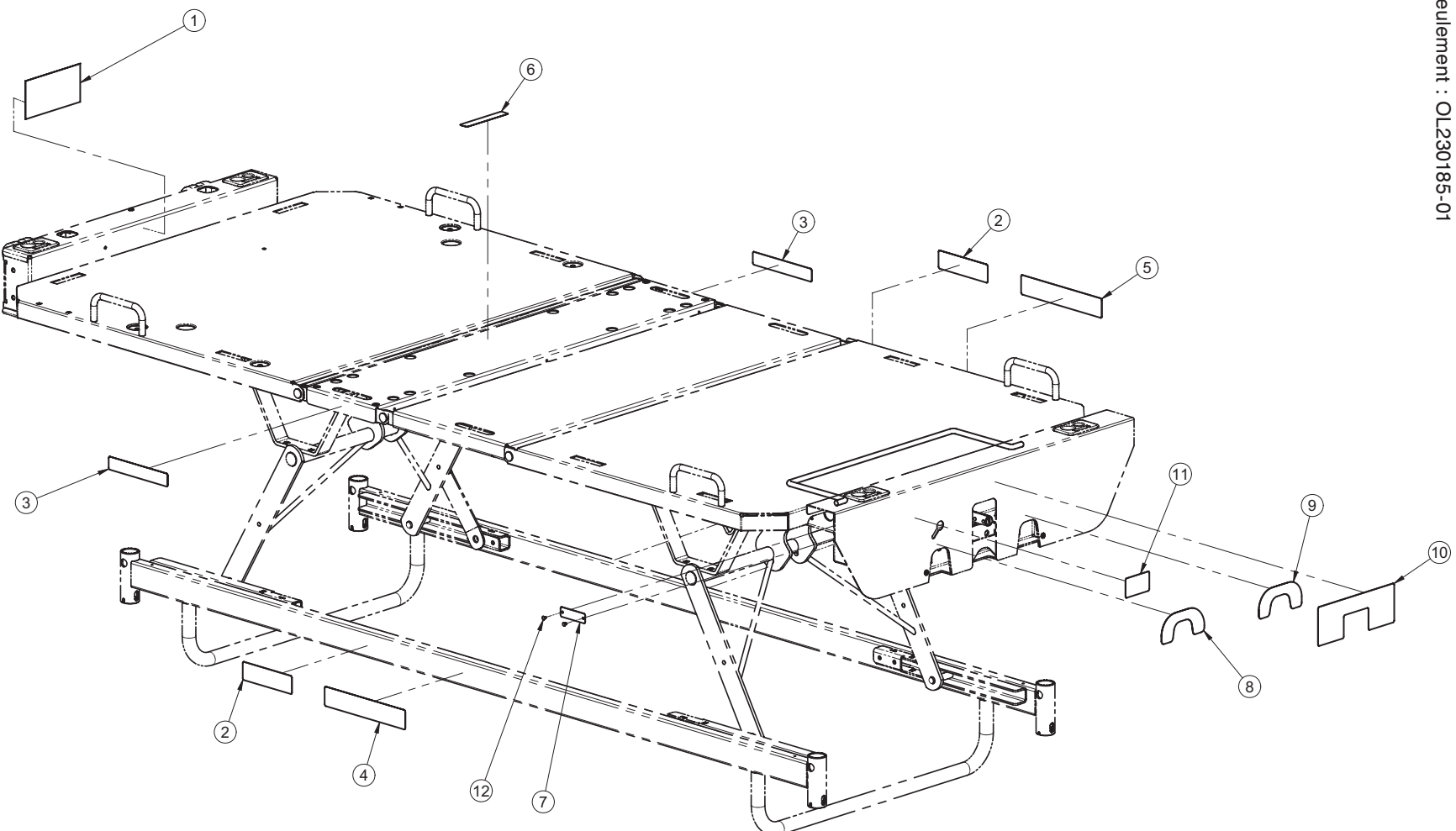

Autocollants FL23M - français/anglais - OL230185

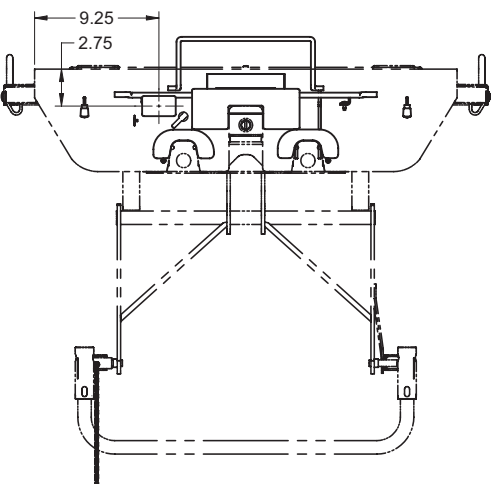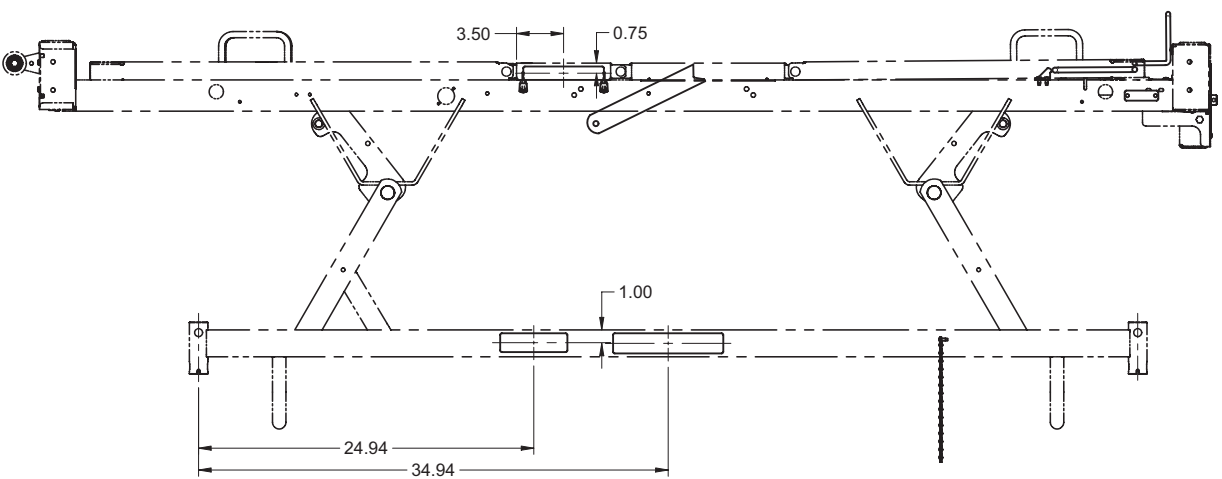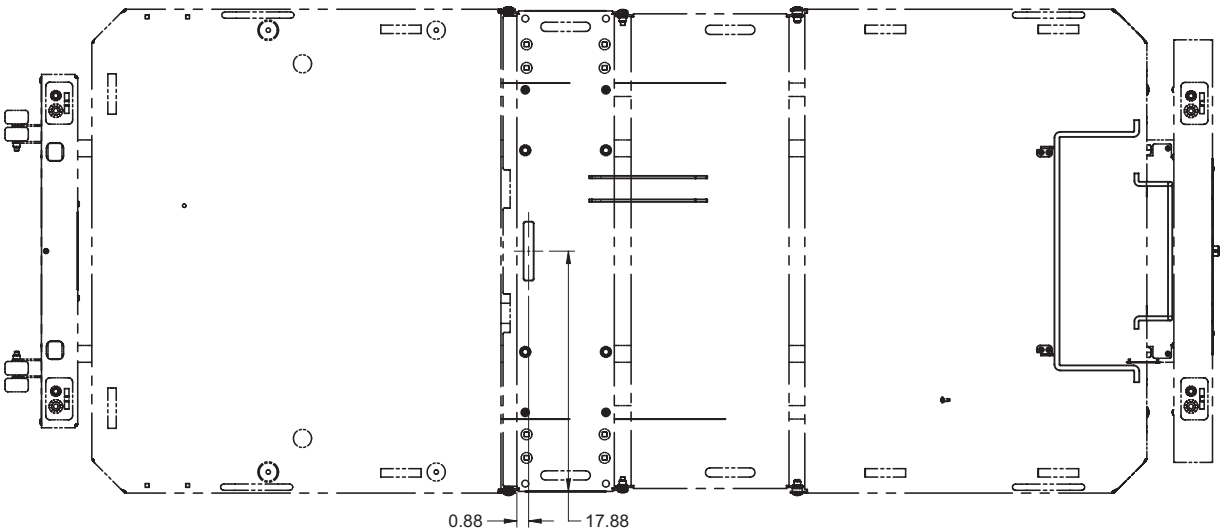

Retour à la table des matières


Autocollants FL23M - français/anglais - OL230185

Référence seulement : OL230185-03

Item	Numéro de pièce	Description	Quantité
1	QE71-0861-F	Autocollant manufacturier	1
2	QE71-0346	Autocollant - STRYKER	2
3	QE71-0547	Autocollant - Charge maximum	2
4	QE71-0739-T	Autocollant - Positions de la pédale droite	1
5	QE71-0740-T	Autocollant - Positions de la pédale gauche	1
6	QE71-0741-T	Autocollant - Épaisseur maximum du matelas	1
7	QE71-0821-T	Plaque du numéro de série	1
8	QE71-0831-F	Autocollant - Mouvement de la section de tête	1
9	QE71-0832-F	Autocollant - Mouvement de la section de cuisse	1
10	QE71-0838-T	Autocollant - Fonctionnement du Trend	1
11	QE71-0856-F	Autocollant - Utilisation des manivelles	1
12	VR11H43	Rivet "POP" #43 tête dôme	2

Protecteur PVC pour côté pleine longueur - OL230208

Référence seulement : OL230208-00

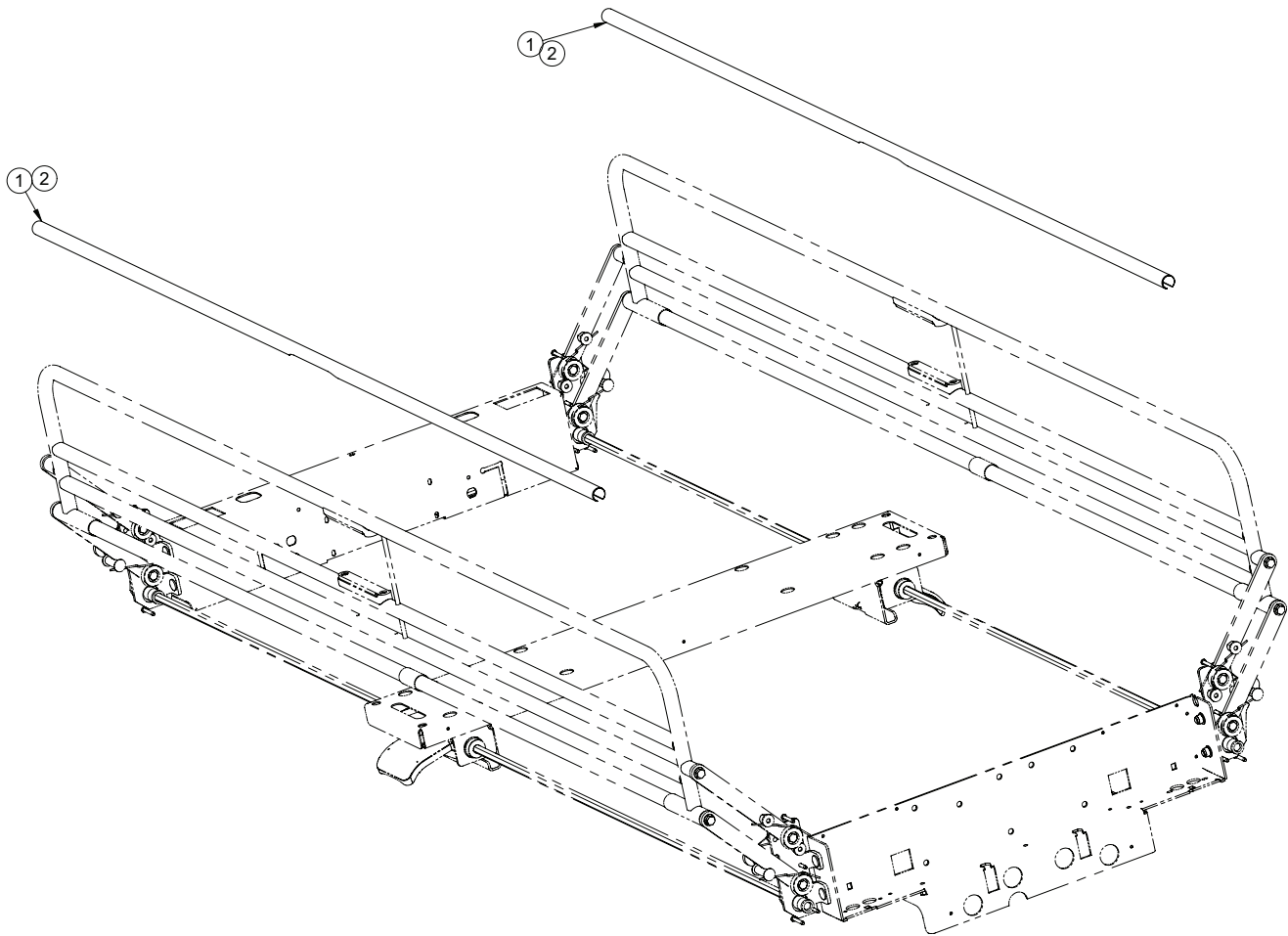



Référence seulement : OL230208-01

Item	Numéro de pièce	Description	Quantité
1	23-0641	Protecteur PVC pour côté pleine longueur	2
2	QDF7826	Ruban adhésif 3M no 950 x 1"	12

Côté de lit pleine longueur rétractable sans contrôle

- OL230211


Référence seulement : OL230211-03

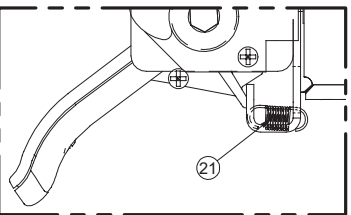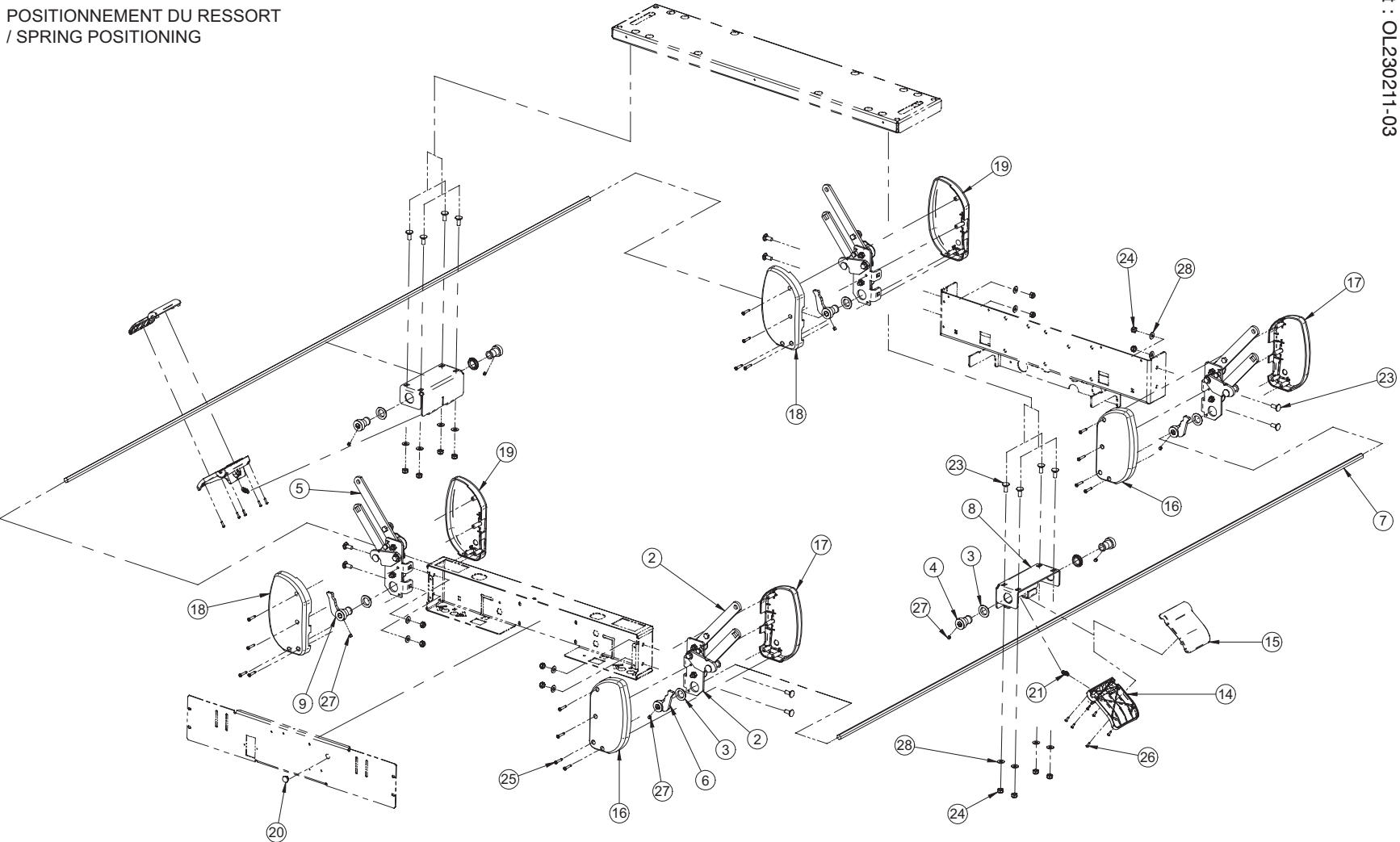

POSITIONNEMENT DU RESSORT
/ SPRING POSITIONING

Côté de lit pleine longueur rétractable sans contrôle

- OL230211

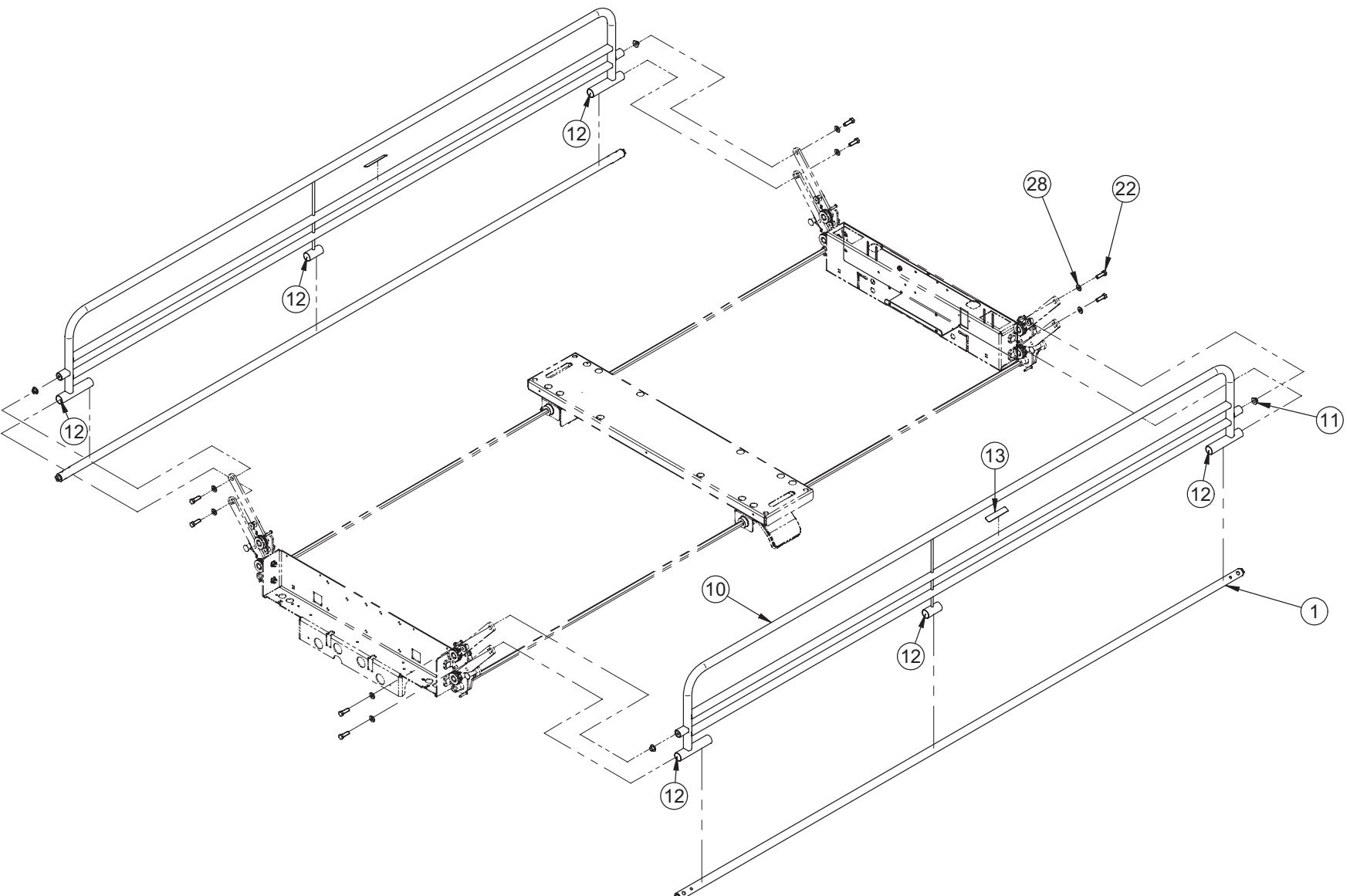

Côté de lit pleine longueur rétractable chromé sans contrôle

- OL230211

Référence seulement : OL230211CG-03

Item	Numéro de pièce	Description	Quantité
1	23-0492C	S.A. Tube de pivot chromé	2
2	23-0535G	S.A. Mécanisme de côté de lit droit	2
3	23-0541	Entretoise à épaulement	8
4	23-0547Z	Douille de blocage	4
5	23-0548G	S.A. Mécanisme de côté de lit gauche	2
6	23-0549Z	S.A. Doigt de désengagement droit	2
7	23-0550Z	Tige de désengagement - tête	2
8	23-0551G	Support de poignée de déverrouillage	2
9	23-0555Z	S.A. Doigt de désengagement gauche	2
10	23-0654C	S.A. Côté de lit pleine longueur chromé sans contrôle	2
11	23-0658	Espaceur	4
12	M0019	Graisse Péto Canada OG 2	0.0300
13	QE71-0764T	Étiquette - Manipuler ici	2
14	QP23-0556-08	Poignée de déverrouillage - partie supérieure	2
15	QP23-0557-08	Poignée de déverrouillage - partie inférieure	2
16	QP23-0623-07	Couvercle extérieur du mécanisme de côté de lit tête droit	2
17	QP23-0624-07	Couvercle extérieur du mécanisme de côté de lit pied droit	2
18	QP23-0625-07	Couvercle extérieur du mécanisme de côté de lit tête gauche	2
19	QP23-0626-07	Couvercle extérieur du mécanisme de côté de lit pied gauche	2
20	QPCE1207	Bouchon diamètre 5/8"-18 UNC jauge 16-18	1
21	QRE23-0561	Ressort d'extension de la poignée de déverrouillage	2
22	VB15A1O32-S	Boulon hexagone 5/16-18 x 1" grade 5 p.z.	8
23	VB35A1O24	Boulon à carrosserie (petit cou) 5/16-18 x 3/4" grade 5 p.z.	16
24	VE30A1O	Écrou hexagone blocage nylon 5/16-18 p.z.	16
25	VV23A1G32HL	Vis taraudeuse tête pan Phillips type High-Low #10 x 1" p.z.	16
26	VV23A9C16HL	Vis taraudeuse High-Low tête pan Phillips type B #6 x 1/2	12
27	VV61A0M08	Vis pression 6 pans creux à insertion nylon 1/4-28 x 1/4"	8
28	VW10A10	Rondelle plate 5/16" SAE p.z.	24

[Retour à la table des matières](#)

Côté de lit pleine longueur rétractable peint sans contrôle


- OL230211

Référence seulement : OL230211G-03

Item	Numéro de pièce	Description	Quantité
1	23-0492G	S.A. Tube de pivot peint	2
2	23-0535G	S.A. Mécanisme de côté de lit droit	2
3	23-0541	Entretoise à épaulement	8
4	23-0547Z	Douille de blocage	4
5	23-0548G	S.A. Mécanisme de côté de lit gauche	2
6	23-0549Z	S.A. Doigt de désengagement droit	2
7	23-0550Z	Tige de désengagement - tête	2
8	23-0551G	Support de poignée de déverrouillage	2
9	23-0555Z	S.A. Doigt de désengagement gauche	2
10	23-0654G	S.A. Côté de lit pleine longueur peint sans contrôle	2
11	23-0658	Espaceur	4
12	M0019	Graisse Péto Canada OG 2	0.0300
13	QE71-0764T	Étiquette - Manipuler ici	2
14	QP23-0556-08	Poignée de déverrouillage - partie supérieure	2
15	QP23-0557-08	Poignée de déverrouillage - partie inférieure	2
16	QP23-0623-07	Couvercle extérieur du mécanisme de côté de lit tête droit	2
17	QP23-0624-07	Couvercle extérieur du mécanisme de côté de lit pied droit	2
18	QP23-0625-07	Couvercle extérieur du mécanisme de côté de lit tête gauche	2
19	QP23-0626-07	Couvercle extérieur du mécanisme de côté de lit pied gauche	2
20	QPCE1207	Bouchon diamètre 5/8"-18 UNC jauge 16-18	1
21	QRE23-0561	Ressort d'extension de la poignée de déverrouillage	2
22	VB15A1O32-S	Boulon hexagone 5/16-18 x 1" grade 5 p.z.	8
23	VB35A1O24	Boulon à carrosserie (petit cou) 5/16-18 x 3/4" grade 5 p.z.	16
24	VE30A1O	Écrou hexagone blocage nylon 5/16-18 p.z.	16
25	VV23A1G32HL	Vis taraudeuse tête pan Phillips type High-Low #10 x 1" p.z.	16
26	VV23A9C16HL	Vis taraudeuse High-Low tête pan Phillips type B #6 x 1/2	12
27	VV61A0M08	Vis pression 6 pans creux à insertion nylon 1/4-28 x 1/4"	8
28	VW10A10	Rondelle plate 5/16" SAE p.z.	24

Couvercle de pied demi-longueur - OL230212

Référence seulement : OL230212-00

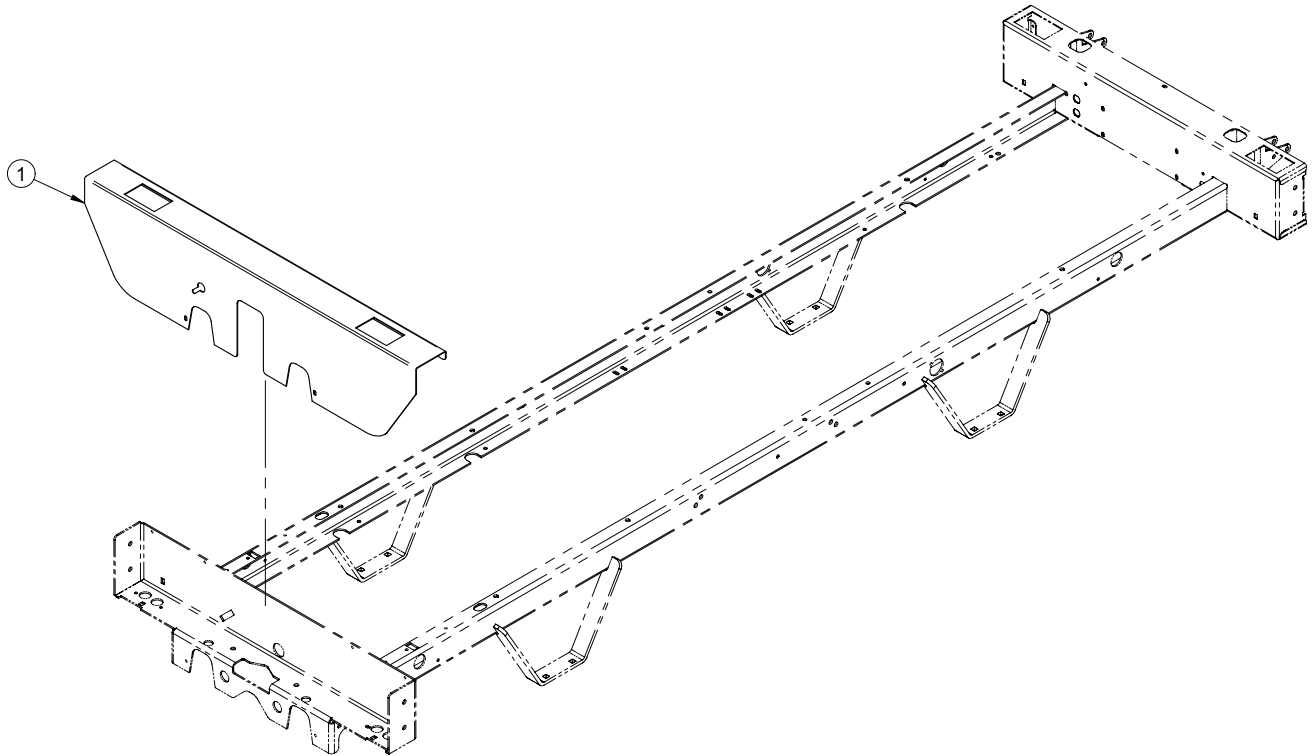


Référence seulement : OL230212G-xx

Item	Numéro de pièce	Description	Quantité
1	23-0361G	Couvercle de boîte de pied - FL23M	1

[Retour à la table des matières](#)

Couvercle de pied demi-longueur - OL230213

Référence seulement : OL230213-00

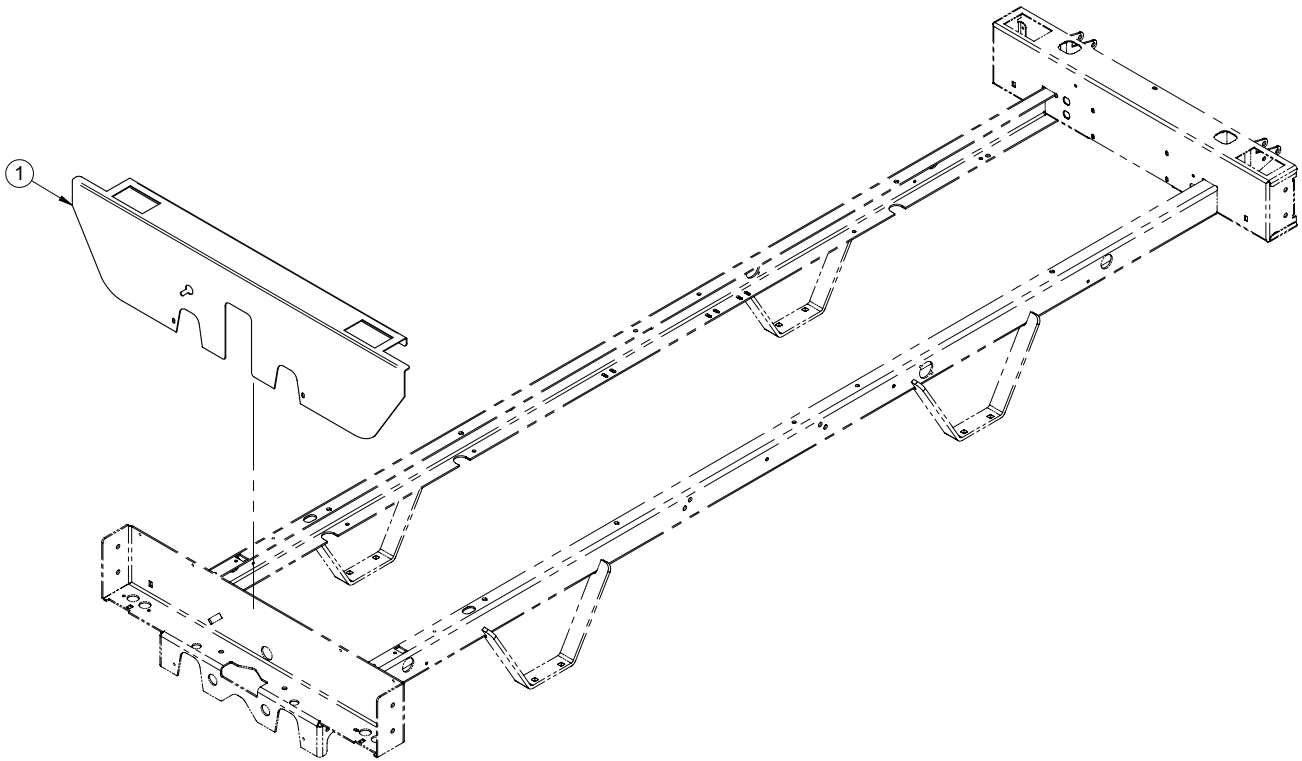


Référence seulement : OL230213G-xx


Item	Numéro de pièce	Description	Quantité
1	23-0653G	Couvercle de pied pleine longueur FL23M	1

5^e roue - OL230219


Référence seulement : OL230219-02

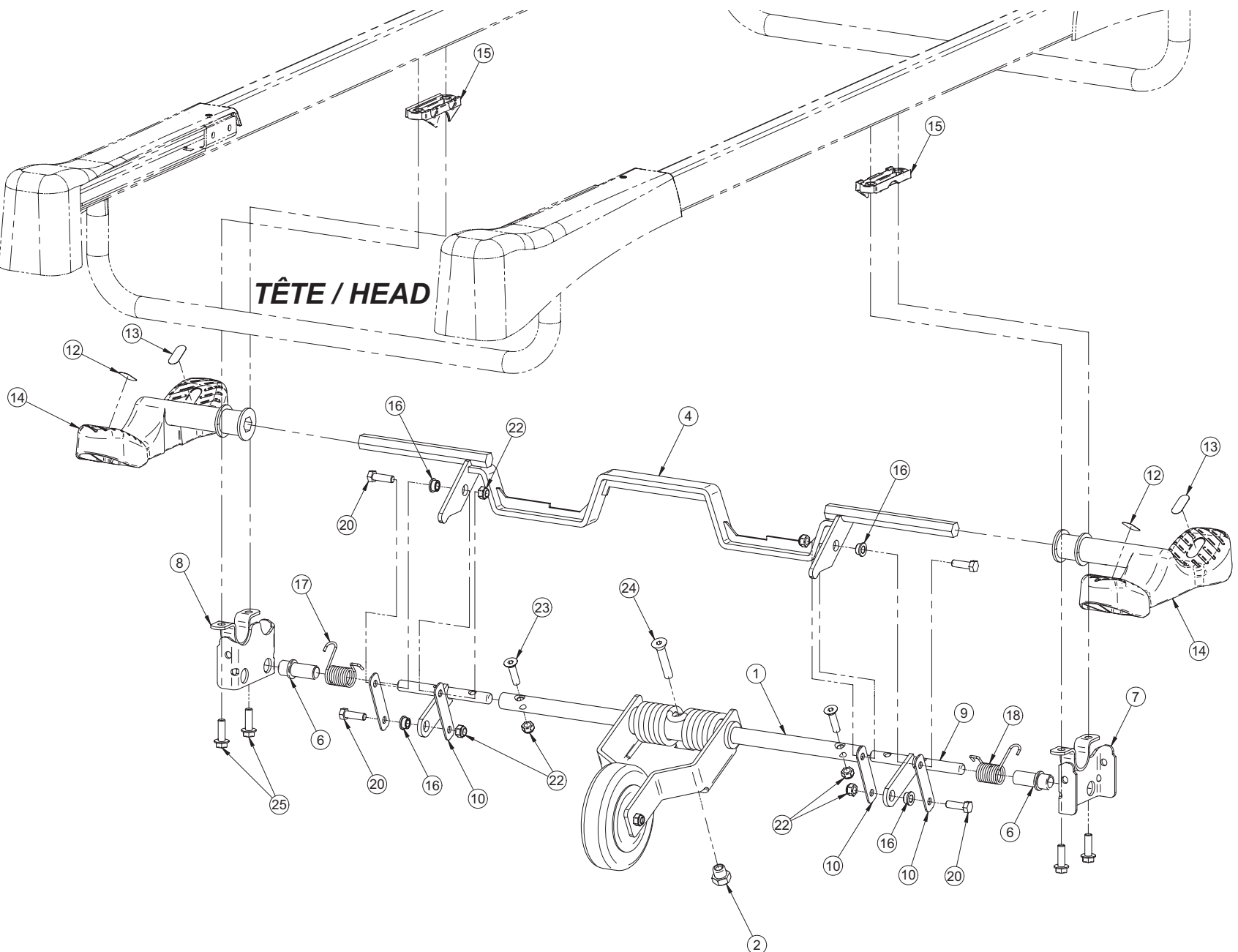

Retour à la table des matières

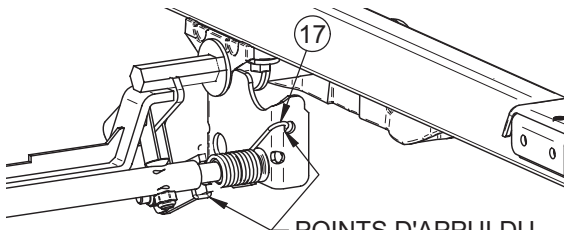

POINTS D'APPUI DU
RESSORT DE RAPPEL
/ RETURN SPRING'S
FULCRUMS

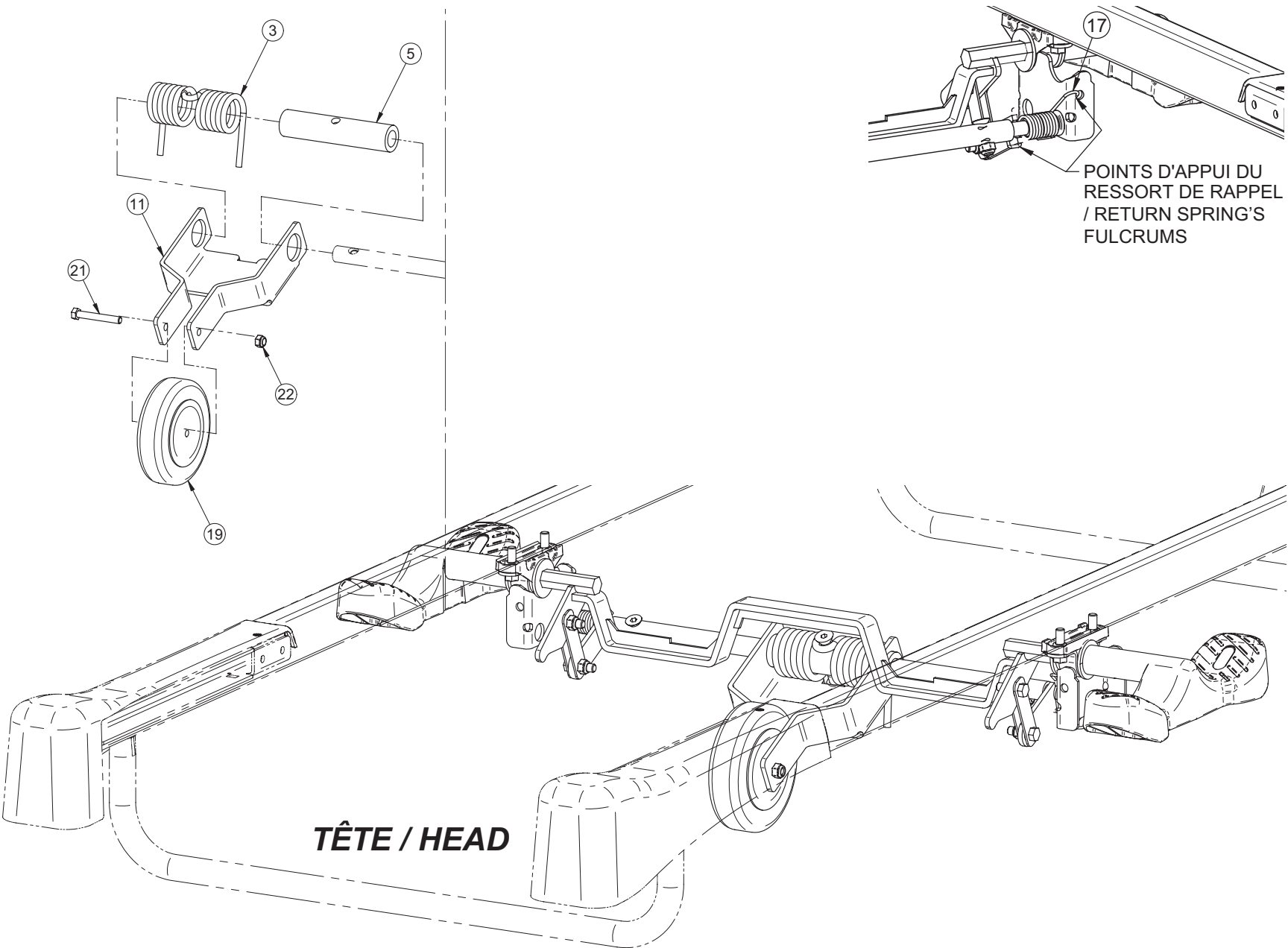

TÊTE / HEAD

5^e roue - OL230219


Référence seulement : OL230219G-01

Item	Numéro de pièce	Description	Quantité
1	17-0082G	Arbre de levier	1
2	17-0104Z	Appui de 5 ^e roue	1
3	17-0124G	Ressort de 5 ^e roue	1
4	23-0714G	S.A. Levier d'actionnement	1
5	25-0068	Coussinet 5 ^e roue	1
6	25-0340	Entretoise 5/16 x 3/16	4
7	25-0581	Coussinet nylon 1/2" diamètre intérieur	2
8	28-0132Z	S.A. Support de 5 ^e roue droit	1
9	28-0133Z	S.A. Support de 5 ^e roue gauche	1
10	28-0149Z	Levier de torsion	2
11	28-0150Z	Contre levier	4
12	28-0151G	Bras de débattement	1
13	QE71-0496	Autocollant 5 ^e roue vert	2
14	QE71-0511	Autocollant frein	2
15	QP23-0627-11	Pédale	2
16	QPA25-0312	Entretoise moulée	2
17	QRD25-0582	Ressort de rappel gauche	1
18	QRD25-0585	Ressort de rappel droit	1
19	RL5	5 ^e roue	1
20	VB18A1O32	Boulon hexagone 5/16-18 x 1" grade 5 p.z.	4
21	VB15A1O50	Boulon hexagone 5/16-18 x 2 1/4" grade 5 p.z.	1
22	VE30A1O	Écrou hexagone blocage nylon 5/16-18 UNC p.z.	7
23	VV11A1O36	Vis tête plate 6 pans creux 5/16-18 UNC x 1 1/4" p.z.	2
24	VV11A1P48	Vis tête plate 6 pans creux 3/8-16 UNC x 2" p.z.	1
25	VVB4A1O32	Boulon 5/16"-18 x 1" filet roulant	4

[Retour à la table des matières](#)

Protecteur PVC - Côté de lit rétractable - OL230226

Référence seulement : OL230226-00

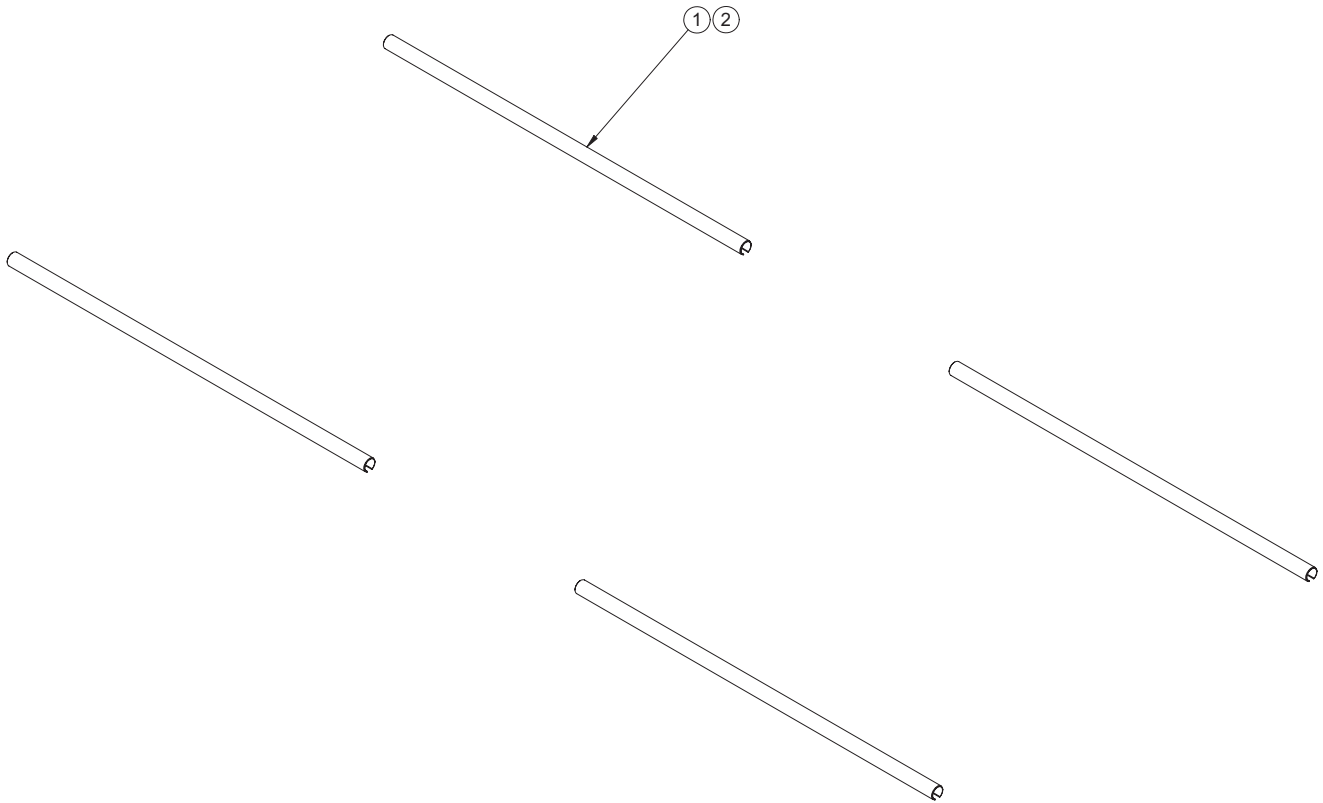


Référence seulement : OL230226-00

Item	Numéro de pièce	Description	Quantité
1	23-0478	Protecteur PVC - Côté de lit de pied 4	
2	QDF7826	Ruban adhésif 3M no 950 x 1"	0.0102

Manivelle pour option manivelles amovibles - OL230228

Référence seulement : OL230228-00

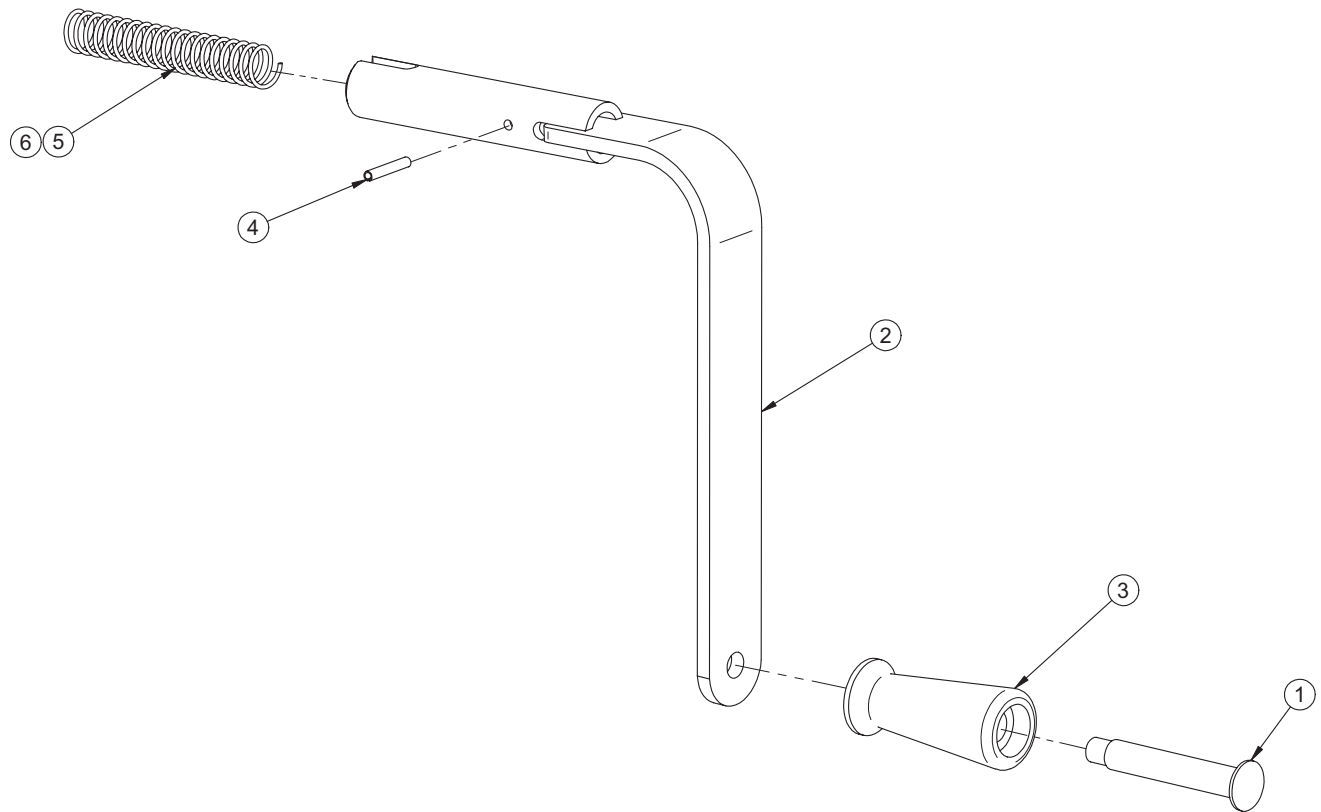


Référence seulement : OL230228-00

Item	Numéro de pièce	Description	Quantité
1	VR43A9439	Rivet à épaulement	1
2	16142C	S.A. Manivelle chromée	1
3	QPN-9438	Poignée de nylon noir	1
4	VG10B0424	Goupille ressort 1/8" x 3/4"	1
5	QRC16887	Ressort de compression	1
6	M0019	Graisse Péto Canada OG 2	0.0300
7	ED2079	Enveloppe JIFFY bulle d'air	1


[Retour à la table des matières](#)

Côtés de lit mi-longueur rétractables - OL230237

Référence seulement : OL230237-00

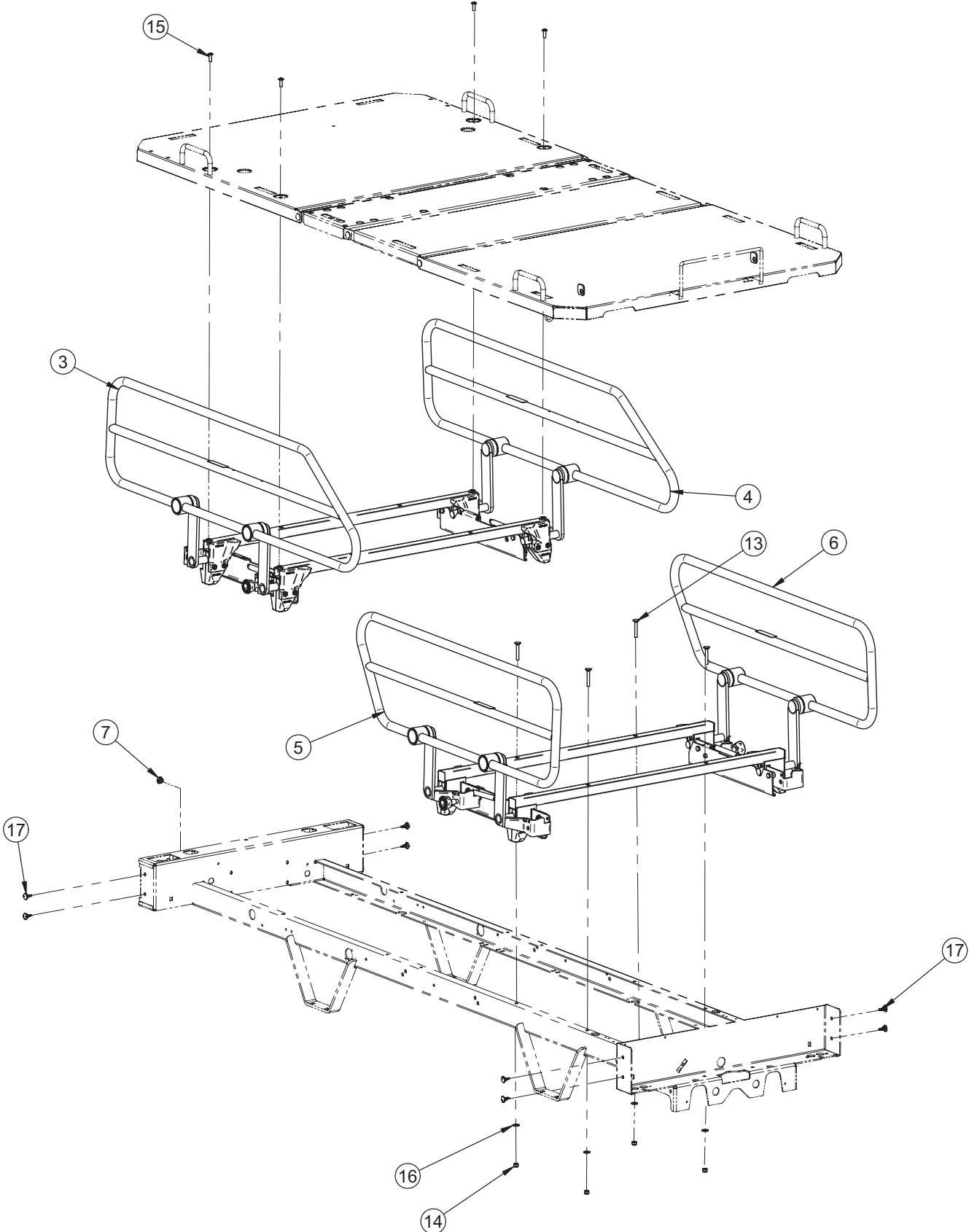

Côtés de lit mi-longueur rétractables - OL230237

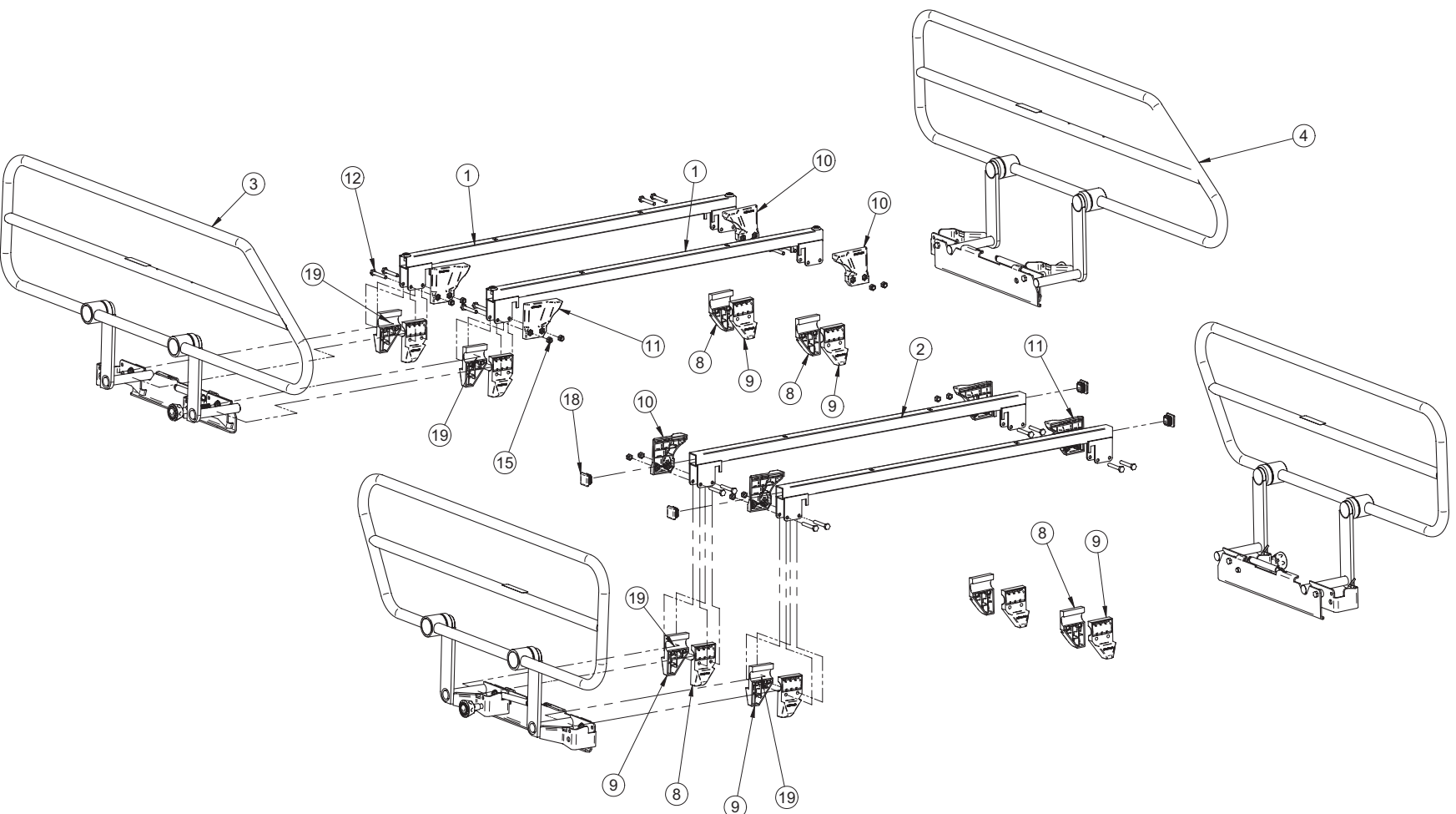

Retour à la table des matières

Côtés de lit mi-longueur rétractables peints - OL230237

Référence seulement : OL230237G-xx

Item	Numéro de pièces	Description	Quantité
1	23-0188	Support de côté de sûreté et insertion	2
2	23-0650G	S.A. Support de côté de sûreté	2
3	23-0759G	S.A. Côté de lit tête droit peint	1
4	23-0760G	S.A. Côté de lit tête gauche peint	1
5	23-0757G	S.A. Côté de sûreté - pied droit peint	1
6	23-0758G	S.A. Côté de sûreté - pied gauche peint	1
7	QPCE1207	Bouchon	1
8	QP18-0240-07	Ancrage - glisseur gauche	8
9	QP18-0241-07	Ancrage - glisseur droit	8
10	QP18-0243-07	Glisseur arrière droit	4
11	QP18-0242-07	Glisseur arrière gauche	4
12	VB15A1N44	Boulon 1/4"-20 x 1 3/4" LG grade 5	16
13	VB35A1N44	Boulon de carrosserie 1/4-20 x 1 3/4" grade 5	4
14	VE30A1N	Écrou à blocage nylon 1/4-20	20
15	VV37A1N24-S	Vis mécanique Truss Phillips 1/4-20 x 3/4" Scotch Grip	4
16	VW10A08	Rondelle plate 1/4 x 1/16	4
17	QP23-0735	Support de PCB	8
18	QDF7908	Bouchon noir 1" #SQR-1-10-14	4
19	M0019	Graisse grade OG 2	1

Côtés de lit mi-longueur rétractables chromés - OL230237


Référence seulement : OL230237CG-xx

Item	Part No.	Part Name	Qty.
1	23-0188	Support de côté de sûreté et insertion	2
2	23-0650G	S.A. Support de côté de sûreté	2
3	23-0759C	S.A. Côté de lit tête droit chromé	1
4	23-0760C	S.A. Côté de lit tête gauche chromé	1
5	23-0757C	S.A. Côté de sûreté - pied droit chromé	1
6	23-0758C	S.A. Côté de sûreté - pied gauche chromé	1
7	QPCE1207	Bouchon	1
8	QP18-0240-07	Ancrage - glisseur gauche	8
9	QP18-0241-07	Ancrage - glisseur droit	8
10	QP18-0243-07	Glisseur arrière droit	4
11	QP18-0242-07	Glisseur arrière gauche	4
12	VB15A1N44	Boulon 1/4"-20 x 1 3/4" LG grade 5	16
13	VB35A1N44	Boulon de carrosserie 1/4-20 x 1 3/4" grade 5	4
14	VE30A1N	Écrou à blocage nylon 1/4-20	20
15	VV37A1N24-S	Vis mécanique Truss Phillips 1/4-20 x 3/4" Scotch Grip	4
16	VW10A08	Rondelle plate 1/4 x 1/16	4
17	QP23-0735	Support de PCB	8
18	QDF7908	Bouchon noir 1" #SQR-1-10-14	4
19	M0019	Graisse grade OG 2	1

[Retour à la table des matières](#)

Panneau mélamine sans module de commande - OP230194

Référence seulement : OP230194XX-00

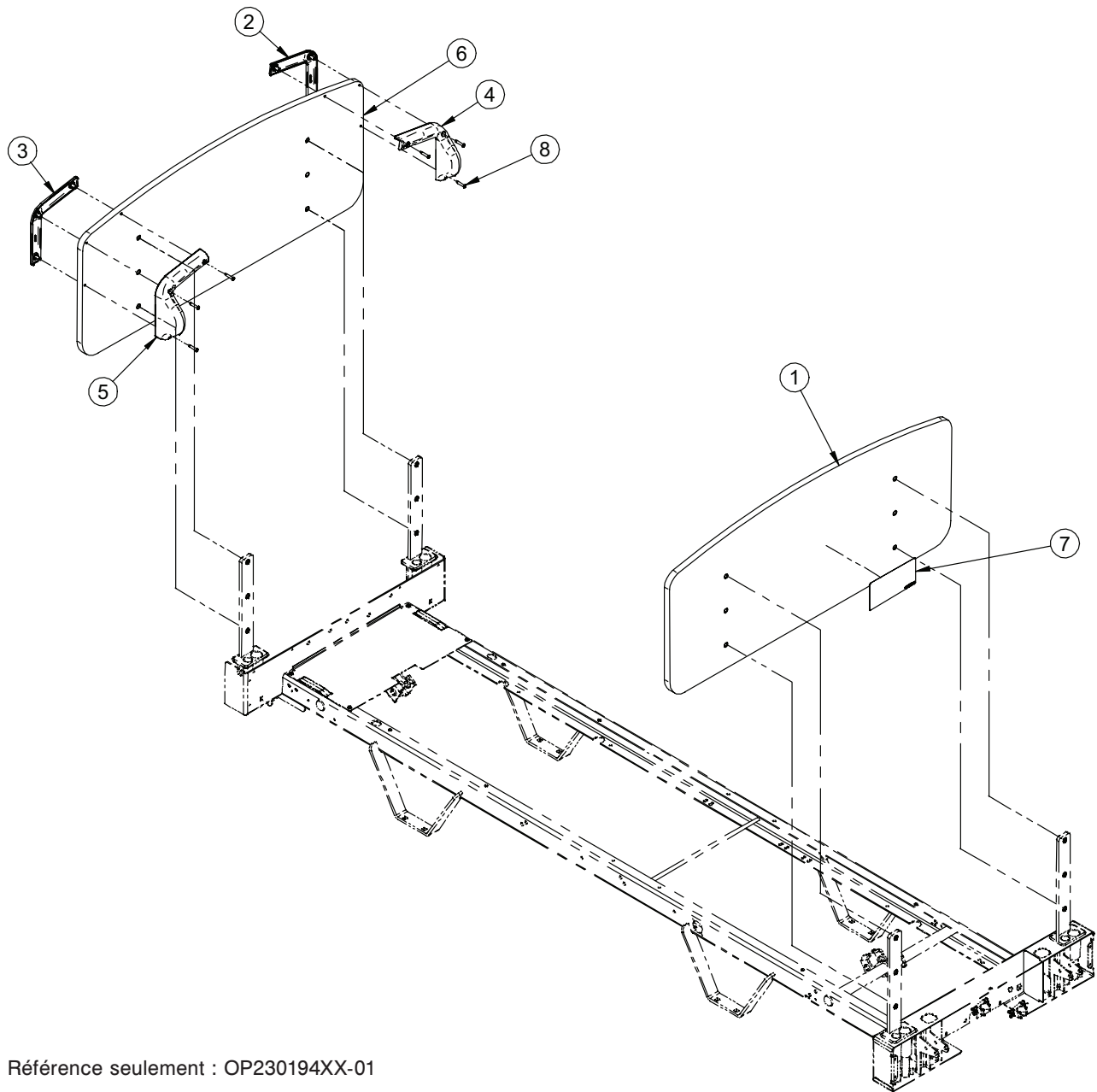


Référence seulement : OP230194XX-01

Item	Numéro de pièce	Description	Quantité
1	XB23-0218XX	Panneau mélamine sans module de commande	1
2	QP23-0472-07	Poignée extérieure droite	1
3	QP23-0473-07	Poignée extérieure gauche	1
4	QP23-0474-07	Poignée intérieure droite	1
5	QP23-0475-07	Poignée intérieure gauche	1
6	23-0514XX	Panneau de pied en mélamine	1
7	QE14376-T	Autocollant - Installation du panneau de tête	1
8	VV23A1G32HL	Vis taraudeuse pan Phillips type High-Low #10 x 1" p.z.	6

[Retour à la table des matières](#)

Panneau MDF stratifié sans module de commande - OP230195

Référence seulement : OP230195XXXX-00

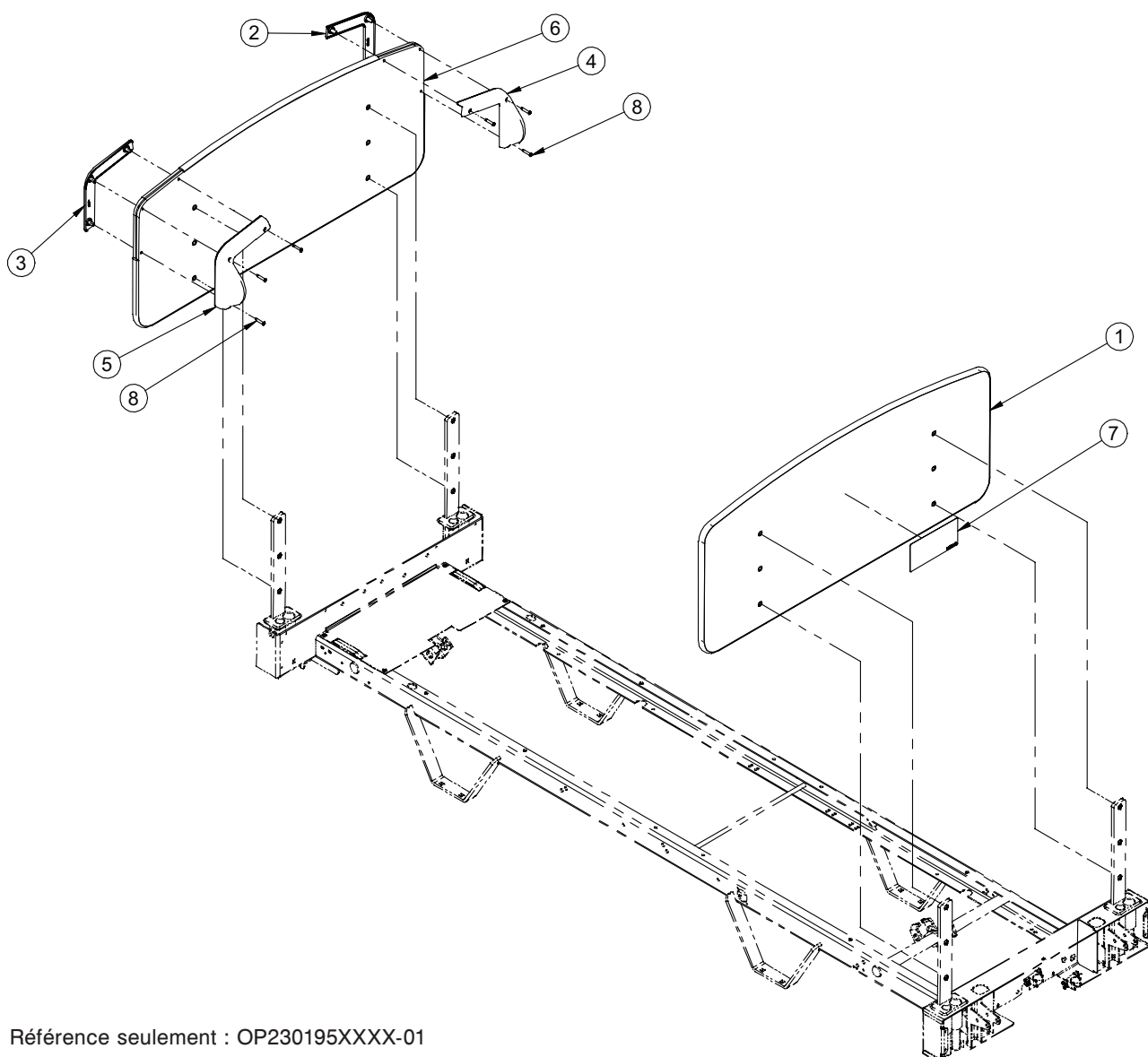


Référence seulement : OP230195XXXX-01

Item	Numéro de pièce	Description	Quantité
1	23-0122XXXX	Panneau MDF stratifié	1
2	QP23-0472-07	Poignée extérieure droite	1
3	QP23-0473-07	Poignée extérieure gauche	1
4	QP23-0474-07	Poignée intérieure droite	1
5	QP23-0475-07	Poignée intérieure gauche	1
6	23-0516XXXX	Panneau stratifié	1
7	QE14376-T	Autocollant - Installation du panneau de tête	1
8	VV23A1G32HL	Vis taraudeuse tête pan Phillips type High-Low #10 x 1" p.z.	6

[Retour à la table des matières](#)

Panneaux massifs sans module de commande - OP230214

Référence seulement : OP230214XX-00

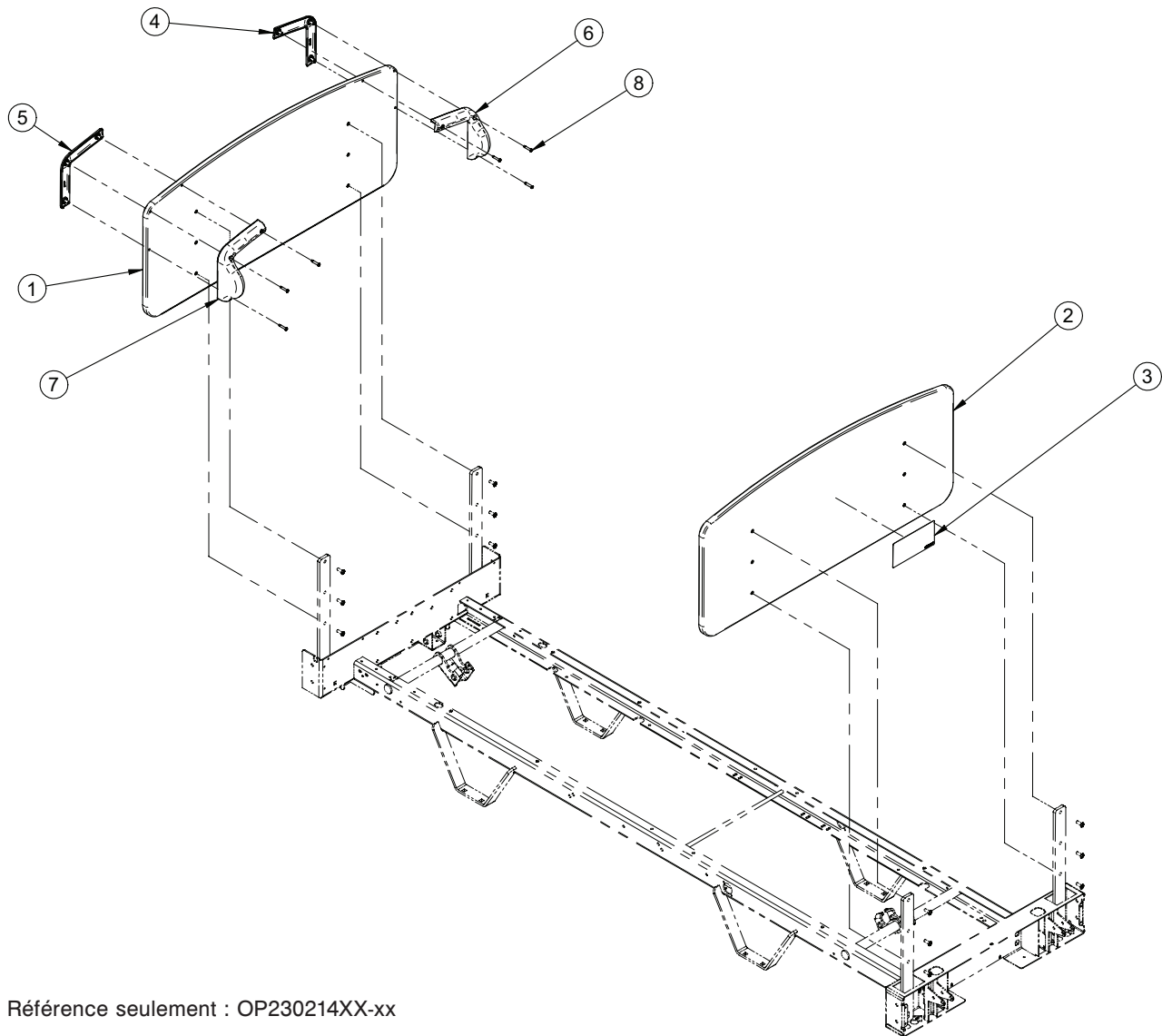

Référence seulement : OP230214XX-xx

Item	Numéro de pièce	Description	Quantité
1	23-0660XX	S.A. Panneau de pied massif sans contrôle	1
2	23-0634XX	Panneau de tête en massif	1
3	QE14376-T	Autocollant - Installation du panneau de tête	1
4	QP23-0472-07	Poignée extérieure droite	1
5	QP23-0473-07	Poignée extérieure gauche	1
6	QP23-0474-07	Poignée intérieure droite	1
7	QP23-0475-07	Poignée intérieure gauche	1
8	VV23A1G32HL	Vis taraudeuse tête pan Phillips type High-Low #10 x 1" p.z.	6

Garantie

GARANTIE LIMITÉE

La division Stryker Médical, une filiale de Stryker Corporation, garantit au premier acheteur que le lit manuel MedSurg modèle FL23M est exempt de toute défectuosité matérielle et de main-d'oeuvre pour une durée de une (1) année après la date de livraison. L'obligation de Stryker sous cette garantie est expressément limitée à fournir des pièces de remplacement et de la main-d'oeuvre ou de remplacer, à son option, tout produit qui est, à la seule discrétion de Stryker, défectueux. Si Stryker en fait la demande, les produits et pièces pour lesquels une réclamation est faite doivent être retournés prépayés à l'usine. Toute utilisation inappropriée, modification ou réparation par d'autre personnel que celui de Stryker de telle manière que le produit est touché matériellement ou adversement selon l'avis de Stryker annule cette garantie. Toute réparation de produits Stryker effectuée avec des pièces non fournies ou non approuvées par Stryker annulera cette garantie. Aucun employé ou représentant de Stryker ne peut modifier cette garantie.

Les produits de type lit de Stryker Médical sont conçus pour une durée de vie prévue de 15 années dans des conditions et avec une utilisation normale ainsi qu'avec un entretien périodique approprié tel que décrit dans le manuel d'entretien pour chaque appareil. Stryker garantit au premier acheteur que les soudures sur ses produits de type lit seront exemptes de toute défectuosité pour la durée de vie prévue de 15 années du produit de type lit tant que le premier acheteur sera propriétaire du produit.

Cette déclaration constitue la garantie complète de Stryker pour l'équipement nommé ci-dessus. **Stryker ne fait aucune autre garantie ou représentation, expresse ou tacite, à l'exception de ce qui a été mentionné dans ce document. Il n'y a pas de garantie de commerciabilité ni de garantie de conformité pour tout but spécifique. Stryker ne peut être tenu responsable pour tout dommage relatif ou corrélatif découlant de la vente ou de l'utilisation de ce type d'équipement.**

PIÈCES ET SERVICE

Les produits de Stryker sont supportés par un réseau d'agents de service international. Ces agents sont spécialement formés en usine et ont, en leur possession, un inventaire de pièces de remplacement afin de diminuer le temps de réparation. Contactez votre représentant local ou téléphonez à notre service technique aux États-Unis: 1 800 327-0770 (option 2) ou au Canada: 1 888 233-6888.

COUVERTURE DES CONTRATS DE SERVICE

Stryker a développé un programme de service avec des options pour garder vos équipement opérationnels à un haut niveau de performance et aussi pour éliminer les coûts de réparation inattendue. Nous recommandons que ces programmes soient activés avant la fin de la garantie initiale afin d'éliminer les risques potentiels d'augmentation de coûts d'un éventuel changement de prix de réparation d'équipement.

Un contrat de service aide à :

- Assurer le rendement des produits
- Stabiliser les coûts des budgets d'entretien
- Diminuer les mises hors service
- Établir la documentation pour le JACHO
- Augmenter la durée de vie du produit
- Augmenter la valeur de revente
- Superviser les risques et la sécurité

Garantie

PROGRAMMES DE CONTRATS DE SERVICE

Stryker offre les programmes de service suivants :

Options de service*	Or	Argent	Pièces	Main-d'oeuvre	Entretien pièces
Entretien préventif annuel	X				X
Toutes pièces	X	X	X		
Main-d'oeuvre et déplacement	X	X		X	
Appels d'urgence de service illimités	X	X		X	
Priorité de contact : réponse téléphonique en deux heures	X	X	X	X	
La majorité des réparations faites en 3 jours	X	X		X	
Documentation JACHO	X	X		X	X
Un journal personnalisé d'entretien pièces et service d'urgence	X				X
Les services d'un technicien formé par Stryker	X	X		X	X
Pièces de remplacement d'origine de Stryker	X	X	X	X	X
Service pendant les heures régulières de bureau (8 h à 17 h)	X	X	X	X	X

* N'inclus pas l'entretien causé par des abus ou l'usure normale des pièces. Stryker se réserve le droit de modifier les options sans préavis.

Stryker Médical offre aussi des contrats de service personnalisés.
Le prix est déterminé par l'âge, la localisation, le modèle et la condition du produit.

**Pour plus d'informations sur nos contrats de services,
veuillez contacter votre représentant local.**

AUTORISATION DE RETOUR

Le retour de marchandise doit être approuvé par le département de Service à la clientèle de Stryker. Un numéro d'autorisation de retour vous sera donné et devra être écrit sur toute marchandise retournée. Stryker se réserve le droit de charger les coûts d'envoi et d'entreposage des produits retournés. **Les pièces spéciales, modifiées ou discontinuées ne peuvent pas être retournées.**

MARCHANDISE ENDOMMAGÉE

Les règles ICC demandent que les réclamations pour marchandise endommagée soient faites directement au transporteur dans les quinze (15) jours suivant la réception de ladite marchandise. **N'acceptez pas de colis endommagés à moins que ces dommages ne soient inscrits sur le bon de livraison.** Avec une demande rapide, Stryker fera une réclamation au transporteur pour les dommages causés à la marchandise. Les réclamations seront limitées aux coûts de remplacement. Dans l'éventualité que ces informations ne soient pas transmises à Stryker dans les quinze (15) jours suivant la date de livraison de la marchandise ou que les dommages n'aient pas été inscrits sur le bon de livraison, le client devra assumer le paiement intégral de la facture originale. Les réclamations pour un envoi de remplacement rapide doivent se faire dans les trente (30) jours suivant la date de facturation.

CLAUSE DE GARANTIE INTERNATIONALE

Cette garantie respecte les exigences des garanties aux États-Unis. Les politiques de garantie à l'extérieur des États-Unis peuvent varier selon les régions. Veuillez contacter votre représentant local de Stryker Médical pour davantage de renseignements.

[Retour à la table des matières](#)

ÉTATS-UNIS
Stryker Médical
3800 E. Centre Ave.,
Portage, Michigan USA
49002

CANADA
Stryker Canada
45 Innovation Drive
Hamilton, Ontario Canada
L9H 7L8

EC	REP
----	-----

Représentant européen

Stryker France
ZAC Satolas Green Pusignan
Av. De Satolas Green
69881 MEYZIEU Cedex
France

stryker[®]